



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
ANMAT

**DISPOSICIÓN N°**

**10409**

**BUENOS AIRES, 03 DIC. 2015**

VISTO el Expediente N° 1-47-14473-10-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones LATECBA S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

↓ LV



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 10409

Que se actúa en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 1490/92, 1886/14 y 1368/15.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca LATECBA, nombre descriptivo Malla de Poliéster Multifilamento y nombre técnico Redes, Poliméricas, de acuerdo con lo solicitado por LATECBA S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorizanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 272 a 274 y 275 a 280 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-459-53, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

1

LV



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 10409

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-14473-10-4

DISPOSICIÓN N° 10409

ec

f

DR. LEONARDO VERNA  
SUBADMINISTRADOR NACIONAL  
DECRETO N° 1368/2015  
A.N.M.A.T.

03 DIC. 2015

10409



**LATECBA S.A.**  
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

**Proyecto de Rotulo**  
**MALLA LATECBA**

Revisión: 3


REGISTRO DE PRODUCTOS

Página 1 de 3

Anexo III B. 2. Según disposición 2318/2002 (texto ordenado según Disposición 1285/2004)

**2. ROTULOS**

**Información del modelo del rótulo:**

2.1.                                -Fabricante:                   **LATECBA S.A.** 

                                      -Dirección:                   **JUAN AGUSTIN MAZA 1948**

**CPA: (C1240ADP) - CABA - República Argentina**

                                      -Contacto                     **Tel. / Fax (+54 11) 4912-0546 / 4912-0641**

**e-mail: [latecba@latecba.com](mailto:latecba@latecba.com) / [www.latecba.com](http://www.latecba.com)**

2.2. La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto médico y el contenido del envase:

Nombre genérico del Producto: **Malla de poliéster multifilamento**

Marca:                            **LATECBA**

Modelo:                          **ABDOPATCH, ABDOSIL, ABDOCOL**

Medidas:                         **XXXXXXX**

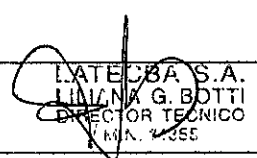
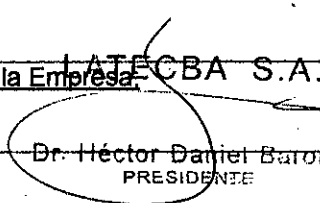
2.3. Si corresponde, la palabra "estéril": **Estéril**

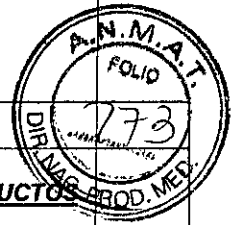
2.4. El código del lote precedido por la palabra "lote" o el número de serie según proceda:

CODIGO:                         **XXXXXXX**   

N° LOTE:                         **XXXXXXX**   

N° SERIE:                        **XXXXXXX**   

<b>Director Técnico:</b>  LATECBA S.A. LILIANA G. BOTTI DIRECTOR TÉCNICO C.A. 4355	<b>Director de la Empresa:</b>  LATECBA S.A. Dr. Héctor Daniel Barone PRESIDENTE
--	--



	<b>Proyecto de Rotulo</b>  <b>MALLA LATECBA</b>	Revisión: <b>3</b>
		<b>REGISTRO DE PRODUCTOS</b>
		Página 2 de 3

2.5. Si corresponde, fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto médico para tener plena seguridad:

Fecha de Fabricación: **XX/XXXX**

Fecha de Vencimiento: **XX/XXXX**

2.6. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso:

**PARA UN SOLO USO**

**NO REESTERILIZAR**

2.7. Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto:

- \*No almacenar a temperaturas extremas, ni en lugares húmedos.
- \*Vencimiento: 5 años después de la fecha de esterilización.
- \*Evitar la luz del sol directa.

2.8. Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos;

- \*Tomar con guantes estériles el envoltorio interno que contiene el dispositivo y depositarlo sobre la mesa de instrumentación.

2.9. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse:

- \*No toxico, no pirógeno
- \*Leer cuidadosamente las instrucciones de uso antes de usar el dispositivo.
- \*No utilizar si el envase está abierto o dañado

Director Técnico:  LILIANA G. BOTTI DIRECTOR TÉCNICO M.N. 4355	Director de la Empresa:  Dr. Héctor Daniel Barona PRESIDENTE
--	---



10/09



Proyecto de Rotulo  
MALLA LATECBA

Revisión: 3

REGISTRO DE PRODUCTOS

Página 3 de 3

2.10. Si corresponde, el método de esterilización:

PRODUCTO ESTERILIZADO POR RADIACION GAMMA

STERILE R (Modelo ABDOCOL)

PRODUCTO ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO

STERILE EO (Modelos ABDOPATCH, ABDOSIL)

2.11. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función:

Liliana G. Botti (Farm.) M.N. N°.: 14355

2.12. Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificación de la Autoridad Sanitaria competente.  
Autorizado por la ANMAT P.M.: 459-53

- Condición de venta:

\*VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS



Ejemplo del proyecto de Rótulo

**MALLA DE POLIESTER MULTIFILAMENTO LATECBA**

MODELO: XXXXXXXX

MEDIDAS: XXXXXXXX

CODIGO: REF XXXXX  
 N° LOTE: LOT XXXXX  
 N° SERIE: SN XXXXX  
 N° ESTERILIZACION: XXXXX  
 FECHA DE FABRICACION: XX / XXXX  
 FECHA VENCIMIENTO: XX / XXXX

\*No utilizar si el envase está abierto o dañado. Cerrar. Producto esterilizado por oxido de etileno.

\*Leer cuidadosamente las instrucciones de uso antes de usar el dispositivo.

\*PARA UN SOLO USO. NO REESTERILIZAR.

\*No almacenar a temperaturas extremas, ni en lugares húmedos, evitar la luz de sol directa.

\*Vencimiento 5 años después de la fecha de esterilización.

\*Tomar con guantes estériles el envoltorio interno que contiene el dispositivo y depositarlo sobre la mesa de instrumentación.

\*VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Autorizado por ANMAT PM. 459-53  
 Directora Técnica: Liliana G. Botti (Farm.) MN N° 14355

Fabricado por LATECBA S.A.  
 Dirección: Juan A. Maza 1946  
 CPA: (C1200 ADP) - CABA - República Argentina  
 Tel/Fax: (+54 11) 4912-0549 / 4912-8041  
 www.latecba.com / latecba@latecba.com

**LATECBA S.A.**  
 INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA  
 Industria Argentina

Director Técnico:

LATECBA S.A.  
LILIANA G. BOTTI  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14355

Director de la Empresa:

Dr. Héctor Daniel Barone  
PRESIDENTE

LATECBA S.A.

1010010109



**LATECBA S.A.**  
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

**Instrucciones de Uso**  
**MALLA LATECBA**

Revisión: 3

REGISTRO DE PRODUCTOS

Página 1 de 6

Anexo III B. 3. Según disposición 2318/2002 (texto ordenado según Disposición 1285/2004)

3.1. Indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítem 2.4 y 2.5:

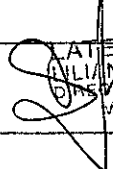
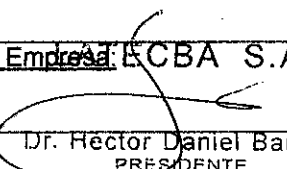
Dirección: **JUAN AGUSTIN MAZA 1948**  
**CPA: (C1240ADP) - CABA - República Argentina**

Contacto **Tel. / Fax (+54 11) 4912-0546**  
**e-mail: latecba@latecba.com / www.latecba.com.**

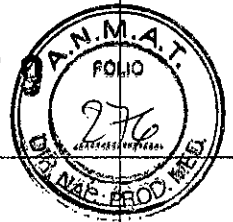
Nombre genérico: **Malla de Poliéster Multifilamento**


Marca: **LATECBA**

Modelo: **ABDOPATCH, ABDOSIL, ABDOSIL**  
**Estéril**  
**PARA UN SOLO USO - NO REESTERILIZAR**  
**\*Vencimiento: 5 años después de la fecha de esterilización.**  
**\*Evitar la luz del sol directa.**  
**\*No toxico, no pirógeno**  
**\*VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS.**  
**\*Leer cuidadosamente las instrucciones de uso antes de usar el dispositivo. Observe con atención las advertencias y precauciones indicadas en ellas para evitar el riesgo de complicaciones.**  
**Modelo ABDOSIL (ESTERILIZADO POR RADIACION GAMMA, todos los envases llevan testigos que viran al rojo)**  
**Modelo ABDOPATCH, ABDOSIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, todos los envases llevan testigos que viran al verde)**  
**Lillana G. Botti (Farm.) M.N. N°.: 14355**  
**Autorizado por la ANMAT P.M.: 459-53**

<p>Director Técnico:   <b>LILLANA G. BOTTI</b>  <b>DIRECTOR TÉCNICO</b>  <b>M.N. 14355</b></p>	<p>Director de la Empresa:   <b>DR. Hector Daniel Barone</b>  <b>PRESIDENTE</b></p>
---	---

10409



 <p><b>LATECBA S.A.</b> INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA</p>	<p><b>Instrucciones de Uso</b></p> <p><b>MALLA LATECBA</b></p>	Revisión: <b>3</b>
		<b><u>REGISTRO DE PRODUCTOS</u></b>
		Página 2 de 6

### **3.2.a Uso propuesto**

Las MALLAS LATECBA, están indicados para la reparación de paredes abdominales y torácicas, como ser hernias y otras deficiencias de la fascia, cuando se requiera de material de refuerzo o conexión.

### **3.2.b Efectos secundarios no deseados**

#### **Efectos adversos.**

Reacción inflamatoria moderada y temporal. No se reabsorbe ni está sujeto a la degradación o debilitación debido a la acción de las enzimas del tejido.

Como todo tipo de implante, la contaminación del mismo conlleva el potencial riesgo de infección, inflamación, adherencia, formación de fístula y extrusión.

#### **Contraindicaciones**

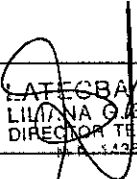
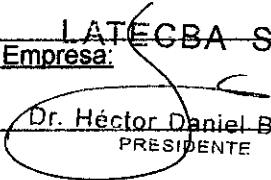
Las contraindicaciones incluyen, entre otras, la siguiente:

- Pacientes alérgicos al Colágeno (para el modelo ABDOCOL)
- Pacientes alérgicos a la Silicona (para el modelo ABDOSIL)
- Pacientes alérgicos a la Poliéster (para todos los modelos)
- Deberá siempre tenerse en cuenta al ser implantado, que no sufra estiramientos, con lo cual tiene que ser contemplado el crecimiento del paciente, sobre todo en niños.
- No debe aplicarse en heridas contaminadas y/o infectadas.
- Está contraindicado para todos los usos diferentes a aquellos establecidos en la sección INDICACIONES.

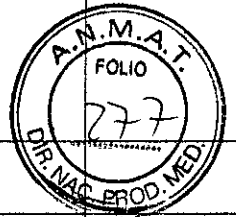
### **3.4.a. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad**

#### **Descripción**

Las MALLAS LATECBA son mallas de poliéster multifilamento tejidas de tramado hexagonal, empleadas generalmente para reparaciones de paredes abdominales y torácicas. El tejido tipo panel de abeja elegido para las MALLAS LATECBA, proporciona las siguientes características: alta resistencia a la tracción, alta porosidad, elasticidad moderada. La tracción está íntimamente relacionada con: el espesor de la tela, su densidad y el material y el grosor del filamento (decitex por filamento).

<p><b>Director Técnico:</b></p>  <p>LATECBA S.A. LILIANA G. BOTTI DIRECTOR TÉCNICO</p>	<p><b>Director de la Empresa:</b></p>  <p>LATECBA S.A. Dr. Héctor Daniel Barone PRESIDENTE</p>
---	--





**LATECBA S.A.**  
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

**Instrucciones de Uso**  
**MALLA LATECBA**

Revisión: 3

REGISTRO DE PRODUCTOS

Página 3 de 6

- El modelo ABDOCOL es impregnado con colágeno bovino. Ideal para el contacto con las vísceras. Otorga un menor infiltrado inflamatorio con la máxima fibrosis. Permite el libre drenaje de fluidos con moderada capacidad para separar planos.

- El modelo ABDOSIL está recubierto con un elastómetro de silicona no reabsorbible. Conserva la resistencia mecánica del esqueleto sin modificar la ductilidad en el manejo quirúrgico. Suave al contacto con los tejidos adyacentes. Presenta una leve respuesta inflamatoria con moderada fibrosis.

**Contenido / Presentación.**

Las MALLAS LATECBA se envasan por unidad.

Se suministran estériles y apirógenas, en doble envase hermético dentro de una caja de cartón forrada con film plástico.

**3.5. Información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico**

**Recomendaciones para la elección de las MALLAS LATECBA**

- La TABLA -1- indica las medidas de ABDOPATCH
- La TABLA -2- indica las medidas de ABDOCOL
- La TABLA -3- indica las medidas de ABDOSIL

Código	Medida
7101	Abdo Patch 5 x 10 cm
7102	Abdo Patch 10 x 10 cm
7103	Abdo Patch 15 x 15 cm
7104	Abdo Patch 20 x 15 cm
7105	Abdo Patch 20 x 20 cm
7106	Abdo Patch 30 x 20 cm
7107	Abdo Patch 30 x 30 cm
7108	Abdo Patch 40 x 40 cm

TABLA -1-

Director Técnico:

LATECBA S.A.  
LILIANA G. BOTTI  
DIRECTOR TÉCNICO  
N. 4323

Director de la Empresa:

Dr. Héctor Daniel Barone  
PRESIDENTE

LATECBA S.A.

Código	Medidas
7201	Abdocol P 10 x 5 cm
7202	Abdocol P 10 x 10 cm
7203	Abdocol P 15 x 15 cm
7204	Abdocol P 20 x 15 cm
7205	Abdocol P 20 x 20 cm
7206	Abdocol P 30 x 20 cm
7207	Abdocol P 30 x 30 cm
7208	Abdocol P 40 x 40 cm
7301	Abdocol NP 10 x 5 cm
7302	Abdocol NP 10 x 10 cm
7303	Abdocol NP 15 x 15 cm
7304	Abdocol NP 20 x 15 cm
7305	Abdocol NP 20 x 20 cm
7306	Abdocol NP 30 x 20 cm
7307	Abdocol NP 30 x 30 cm
7308	Abdocol NP 40 x 40 cm

TABLA -2-

Código	Medidas
7401	Abdosil 10 x 5 cm
7402	Abdosil 10 x 10 cm
7403	Abdosil 15 x 15 cm
7404	Abdosil 20 x 15 cm
7405	Abdosil 20 x 20 cm
7406	Abdosil 30 x 20 cm
7407	Abdosil 30 x 30 cm
7408	Abdosil 40 x 40 cm

TABLA -3-

**Procedimiento de uso**

- Abra la caja de cartón exterior y retire de ella la prótesis contenido en doble envase hermético.
- Verifique la integridad del doble envase hermético que contiene la prótesis. Si el mismo está dañado, descártela.
- Abra con técnica aséptica el primer sobre pelable del envase y deposite el segundo sobre interior que contiene la malla sobre la mesa estéril de instrumentación.

Director Técnico:

LATECBA S.A.  
JULIANA G. BOTTI  
DIRECTOR TÉCNICO  
C.I.V. 14355

Director de la Empresa: ECBA S.A.

Dr. Hector Daniel Barone  
PRESIDENTE



**LATECBA S.A.**  
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

**Instrucciones de Uso**  
**MALLA LATECBA**

Revisión: 3

REGISTRO DE PRODUCTOS

Página 5 de 6

- Con técnicas asépticas habituales, manipule el envase hermético interior para retirar la prótesis del mismo.
- Implante por medio de cirugía general o laparoscópica.
- Se recomienda usar suturas no absorbibles, preferentemente polipropileno, cuyo calibre sea 2.0 o 3.0mm con aguja de medio círculo de 20 o 25 mm y punta redonda.
- Después de su uso, desechar el envase de acuerdo a las normas administrativas del hospital y/o de las autoridades locales.

**NOTA:** Para el modelo ABDOCOL, previo al implante, hidratar con solución fisiológica estéril.

**Almacenamiento y manipulación**

Manipule con cuidado y evite la exposición a condiciones extremas de temperaturas y humedad. Evitar la luz del sol directa.

**Advertencias**

- No reesterilice el injerto.
- Dispositivo para un solo uso.
- Se recomienda el uso de suturas atraumáticas de punta redonda. Otro tipo de agujas podría cortar las fibras del tejido.

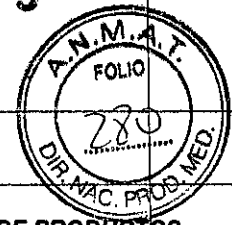
**Precauciones**

- No use el dispositivo si está dañado o si está comprometida su barrera estéril.
- No use el dispositivo después de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.
- No re-esterilice. Es un dispositivo para un solo uso.

**3.7. Instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad**

- No use el dispositivo si está dañado el envase o si está comprometida la barrera estéril.

Director Técnico:	 LATECBA S.A. LILIANA C. BATTI DIRECTOR TÉCNICO M.A. 4355	Director de la Empresa:	 LATECBA S.A. Dr. Héctor Daniel Barone PRESIDENTE
-------------------	---	-------------------------	--



	<p><b>Instrucciones de Uso</b></p> <p><b>MALLA LATECBA</b></p>	Revisión: <b>3</b>
		<b>REGISTRO DE PRODUCTOS</b>
		Página 6 de 6

**3.14. Precauciones que deban adoptarse si un producto medico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación**

LATECBA S.A. garantiza que este dispositivo ha sido diseñado y fabricado en cumplimiento con la normativa legal vigente.

Esta garantía sustituye expresamente cualquier otra garantía expresa o implícita de comercialización y será válida solo en caso de que su utilización sea la expresamente indicada para el uso para el que este dispositivo fue diseñado y producido. La presente garantía sólo será válida si el implante fue realizado con exacto cumplimiento del presente manual de uso. El manejo, almacenamiento, limpieza y esterilidad de este producto así como otros factores relacionados con el paciente, diagnóstico, tratamiento y procedimientos quirúrgicos están más allá de control de LATECBA SA y afectan directamente al dispositivo y los resultados obtenidos de su utilización. La única obligación de LATECBA SA será la de reparar o reemplazar este dispositivo por defectos que le sean imputables en forma directa y no se responsabilizará de ningún daño incidental, especial, pérdida consecuente o gasto resultante, directa o indirectamente del uso de este producto.

LATECBA S.A. no asume ninguna responsabilidad respecto a productos que se reutilicen, reprocesen o re-esterilicen.

<p><b>Director Técnico:</b></p> <p>LATECBA S.A. LILIANA G. BOTTA DIRECTOR TÉCNICO. C.N. 14355</p>	<p><b>Director de la Empresa:</b></p> <p>LATECBA S.A.</p> <p>Dr. Héctor Daniel Barone PRESIDENTE</p>
---	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
ANMAT

ANEXO  
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-14473-10-4

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº ..... **10409** y de acuerdo con lo solicitado por LATECBA S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Malla de Poliéster Multifilamento.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 12-510 Redes, Poliméricas.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): LATECBA

Clase de Riesgo: IV.

Indicación/es autorizada/s: reparación de paredes abdominales y torácicas, como ser hernias y otras deficiencias de la fascia, cuando se requiera de material de refuerzo o conexión.

Modelo/s: ABDOPATCH, ABDOSIL, ABDOCOL.

Código Medida

7101 Abdo Patch 5 x 10 cm

7102 Abdo Patch 10 x 10 cm

LV

- 7103 Abdo Patch 15 x 15 cm
- 7104 Abdo Patch 20 x 15 cm
- 7105 Abdo Patch 20 x 20 cm
- 7106 Abdo Patch 30 x 20 cm
- 7107 Abdo Patch 30 x 30 cm
- 7108 Abdo Patch 40 x 40 cm

Código Medidas

- 7201 Abdocol P 10 x 5 cm
- 7202 Abdocol P 10 x 10 cm
- 7203 Abdocol P 15 x 15 cm
- 7204 Abdocol P 20 x 15 cm
- 7205 Abdocol P 20 x 20 cm
- 7206 Abdocol P 30 x 20 cm
- 7207 Abdocol P 30 x 30 cm
- 7208 Abdocol P 40 x 40 cm
- 7301 Abdocol NP 10 x 5 cm
- 7302 Abdocol NP 10 x 10 cm
- 7303 Abdocol NP 15 x 15 cm
- 7304 Abdocol NP 20 x 15 cm
- 7305 Abdocol NP 20 x 20 cm
- 7306 Abdocol NP 30 x 20 cm
- 7307 Abdocol NP 30 x 30 cm

L W



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
ANMAT

Código	Medidas
7401	Abdosil 10 x 5 cm
7402	Abdosil 10 x 10 cm
7403	Abdosil 15 x 15 cm
7404	Abdosil 20 x 15 cm
7405	Abdosil 20 x 20 cm
7406	Abdosil 30 x 20 cm
7407	Abdosil 30 x 30 cm
7408	Abdosil 40 x 40 cm

Período de vida útil: 5 (cinco) años.

Forma de presentación: envase por unidad.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Latecba S.A.

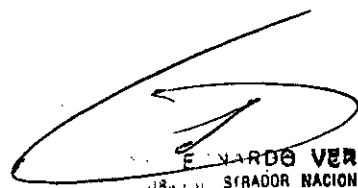
Lugar/es de elaboración: Maza 1948/1950, PB., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fuente de obtención de materia prima: Colágeno bovino de origen Argentina.

Se extiende a LATECBA S.A. el Certificado de Autorización e Inscripción del PM-459-53, en la Ciudad de Buenos Aires, a ..... **03 DIC. 2015** ..... , siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N° **10409**

✓

  
EDUARDO VERNA  
SECRETARIO NACIONAL  
DECRETO N° 1368/2015  
A.N.M.A.T.