



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-47-3110-7453-18-6

---

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-7453-18-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones PROPATO HNOS. S.A.I.C., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

## DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca: ALISON, AS, ATHILA, AUDAX, AUSTER, BIOSHIELD, CLIN, CLYSTER, CONSORTIUM, CORONATION, CYRUX, DARLING, DEXAL, DUBBLE, DUKE, EMAX, FLAVIA, FUREY, GUANTA, HAND, INNOVO, JAXA, KEY, KEYDENT, K KAUTION, MERCOMED, NEOJET, NEOMED, PRILLI, PRINTEX, PROPATO, PROVEIN, PS ANESTHESIA, QUANTUS, RADIATOR, SIPRO, SUNRAY, TODOSAN, TOPSAL, TRUX, UNO, VISCONT, nombre descriptivo: Instrumental para Electrocirugía y nombre técnico: Unidades para Electrocirugía, Monopolares, de acuerdo con lo solicitado por PROPATO HNOS. S.A.I.C., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento GEDO N° IF-2020-06788324-APN-INPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-647-283, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

## DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Instrumental para Electrocirugía

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-229 Unidades para Electrocirugía, Monopolares

Marca de los productos médicos: ALISON, AS, ATHILA, AUDAX, AUSTER, BIOSHIELD, CLIN, CLYSTER, CONSORTIUM, CORONATION, CYRUX, DARLING, DEXAL, DUBBLE, DUKE, EMAX, FLAVIA, FUREY, GUANTA, HAND, INNOVO, JAXA, KEY, KEYDENT, K KAUTION, MERCOMED, NEOJET, NEOMED, PRILLI, PRINTEX, PROPATO, PROVEIN, PS ANESTHESIA, QUANTUS, RADIATOR, SIPRO, SUNRAY, TODOSAN, TOPSAL, TRUX, UNO, VISCONT

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Para el corte de tejidos y la coagulación mediante la utilización de un generador

electroquirúrgico de alta frecuencia.

Modelo/s: a) Lápiz/Mango para Electrocirugía para uso de mano (HC-EP1 series) o de pie (HC-EP2 series), b) con botonera tipo elíptica (HC-EP1-A), con botón tradicional (HC-EP1-B) o con botón tipo rocket (HP-EP1-C). Accesorios: a) Cartuchera para mango para electrobisturí (HC-EPP2-A), b) Cables con diferentes tipos de conectores, diámetros y largos (HC-L1-L2-L3 series, c) Limpiadores de puntas de electrobisturí (HC-EPP3-A), d) Placas paciente para electrobisturí, con o sin cable incorporados, de 1 parte o 2 partes, y en diferentes tamaños (adulto, pediátrico, neonatal) (HC-NE1-1A/ HC-NE1-1B/ HC-NE1-2A/ HC-NE1-2B/ HC-NE2-1A/ HC-NE2-1B/ HC-NE2-2A/ HC-NE2-2B/ HC-NE3-1A/ HC-NE3-1B/ HC-NE3-2A/ HC-NE3-2B), e) Puntas para electrobisturí (HC-EPP1-A/HC-EPP1-B/HC-EPP1-C)

Período de vida útil: Lápiz para Electrocirugía: tres (3) años, cable para placa paciente: tres (3) años, placa paciente: dos (2) años

Forma de presentación: Lápiz para Electrocirugía: Una unidad/ Una unidad con cartuchera/ Una unidad con cable para placas/ Una unidad con limpiadores de puntas de electrobisturí/ Una unidad con placa paciente/ Una unidad con puntas para electrobisturí.

Cable para placa paciente: Una unidad.

Placa paciente: Una unidad.

Condición de venta: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Jinhua Huacheng Medical Appliance Co., Ltd.

Lugar/es de elaboración: No.186 Qingyu Road Jindong Industrial Park Jinhua City 321000, Zhejiang, China.

Expediente N° 1-47-3110-7453-18-6



Equipamiento e Insumos Hospitalarios

Av. Rodríguez Peña 2045 - B1676BUO - Santos Lugares - Bs. As.  
Teléfono: 011-4757-9064 (L.Rot.) - Fax: 54-11-4757-0276 / 2708  
web: www.propato.com.ar - e-mail: propato@propato.com.ar



## PROYECTO DE RÓTULO DE LÁPIZ PARA ELECTROCIRUGÍA

1. Fabricado por: Jinhua Huacheng Medical Appliance Co., Ltd. - No.186 Qingyu Road Jindong Industrial Park Jinhua City 321000, Zhejiang, China.
2. Importado por PROPATO HNOS. S.A.I.C., Equipamientos e Insumos Hospitalarios – Av. Rodríguez Peña 2045/2169 – Santos Lugares – Bs. As. - Argentina
3. Lápiz para electrocirugía
4. Marca: XX
5. Modelo: XX
6. Producto estéril (Esterilizado por ETO)
7. De un solo uso.
8. Producto libre de látex.
9. Producto libre de ftalatos.
10. Leer instrucciones de uso. Los generadores utilizados deben ser de alta frecuencia – 625kHz- aislados con modos de corte y modos de coagulación monopolar, con una potencia máxima de por lo menos 200W.
11. N° Lote:
12. Fecha de fabricación:
13. Fecha de Vencimiento: 3 años a partir de su fecha de fabricación.
14. Formas de presentación: Una unidad/ Una unidad con cartuchera/ Una unidad con cable para placas/ Una unidad con limpiadores de puntas de electrobisturí/ Una unidad con placa paciente /Una unidad con puntas para electrobisturí.
15. Almacenar en lugar fresco y seco.
16. Director Técnico: Gustavo Daniele – Farmacéutico – MN 13086
17. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-647-283
18. Condición de venta: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

PABLO GÓMEZ CARATTO  
APODERADO

PROPATO HNOS. S.A.I.C.


Farm. GUSTAVO F. DANIELE  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.N. 13086 M.P.B.A. 19853  
D.N.I. 22.629.988 /





Equipamiento e Insumos Hospitalarios

Av. Rodríguez Peña 2045 - B1676BUO - Santos Lugares - Bs. As.  
Teléfono: 011-4757-9064 (L.Rot.) - Fax: 54-11-4757-0276 / 2708  
web: www.propato.com.ar - e-mail: propato@propato.com.ar

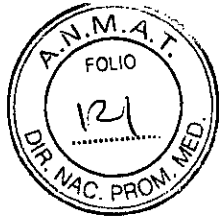

### PROYECTO DE RÓTULO DE CABLES PARA PLACAS PACIENTE

1. Fabricado por: Jinhua Huacheng Medical Appliance Co., Ltd. - No.186 Qingyu Road Jindong Industrial Park Jinhua City 321000, Zhejiang, China.
2. Importado por PROPATO HNOS. S.A.I.C., Equipamientos e Insumos Hospitalarios – Av. Rodríguez Peña 2045/2169 – Santos Lugares – Bs. As. - Argentina
3. Cable para placa paciente
4. Marca: XX
5. Modelo: XX
6. Producto no estéril.
7. De un sólo uso.
8. Producto libre de látex.
9. Producto libre de ftalatos.
10. N° Lote:
11. Fecha de fabricación:
12. Fecha de Vencimiento: 3 años a partir de su fecha de fabricación.
13. Formas de presentación: Una unidad.
14. Almacenar en lugar fresco y seco.
15. Director Técnico: Gustavo Daniele – Farmacéutico – MN 13086
16. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-647-283
17. Condición de venta: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

PROPATO HNOS. S.A.I.C.  
PABLO GÓMEZ CARATTO  
APODERADO

PROPATO HNOS. S.A.I.C.  
Farm. GUSTAVO F. DANIELE  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.N. 13086 M.P.B.A. 18563  
D.N.I. 22.420.000





// Equipamiento e Insumos Hospitalarios

Av. Rodríguez Peña 2045 - B1676BUO - Santos Lugares - Bs. As.  
Teléfono: 011-4757-9064 (L.Rot.) - Fax: 54-11-4757-0276 / 2708  
web: www.propato.com.ar - e-mail: propato@propato.com.ar

## PROYECTO DE RÓTULO PARA PLACAS PACIENTE

1. Fabricado por: Jinhua Huacheng Medical Appliance Co., Ltd. - No.186 Qingyu Road Jindong Industrial Park Jinhua City 321000, Zhejiang, China.
2. Importado por PROPATO HNOS. S.A.I.C., Equipamientos e Insumos Hospitalarios – Av. Rodríguez Peña 2045/2169 – Santos Lugares – Bs. As. - Argentina
3. Placa paciente para lápiz electroquirúrgico
4. Marca: XX
5. Modelo: XX
6. Producto no estéril.
7. De un solo uso.
8. Producto libre de látex.
9. Producto libre de ftalatos.
10. N° Lote:
11. Fecha de fabricación:
12. Fecha de Vencimiento: 2 años a partir de su fecha de fabricación.
13. Formas de presentación: Una unidad.
14. Almacenar en lugar fresco y seco.
15. Director Técnico: Gustavo Daniele – Farmacéutico – MN 13086
16. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-647-283
17. Condición de venta: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

PABLO GÓMEZ CARATTO  
APODERADO

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

Farm. GUSTAVO F. DANIELE  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.N. 13086 M.P.B.A. 18583  
D.N.I. 22.520.888






**ANEXO III B**

**PROYECTO INSTRUCCIONES DE USO DE LÁPIZ PARA ELECTROCIRUGÍA/CABLE PARA PLACA PACIENTE/ PLACA PACIENTE**

1. Fabricado por: Jinhua Huacheng Medical Appliance Co., Ltd. - No.186 Qingyu Road Jindong Industrial Park Jinhua City 321000, Zhejiang, China.
2. Importado por PROPATO HNOS. S.A.I.C., Equipamientos e Insumos Hospitalarios – Av. Rodríguez Peña 2045/2169 – Santos Lugares – Bs. As. – Argentina
3. Lápiz para electrocirugía/Cable para placa paciente/Placas paciente
4. Marca: XX
5. Modelo: XX
6. Producto estéril (Esterilizado por ETO) /Producto no estéril/ Producto no estéril.
7. De un solo uso.
8. Producto libre de látex.
9. Producto libre de ftalatos.
10. Leer instrucciones de uso. Los generadores utilizados deben ser de alta frecuencia – 625kHz- aislados con modos de corte y modos de coagulación monopolar, con una potencia máxima de por lo menos 200W.
11. Forma de presentación: - Lápiz para electrocirugía: Una unidad/ Una unidad con cartuchera/ Una unidad con cable para placas/ Una unidad con limpiadores de puntas de electrobisturí/ Una unidad con placa paciente /Una unidad con puntas para electrobisturí.
  - Cable para placa paciente: Una unidad.
  - Placa paciente: Una unidad.
12. Almacenar en lugar fresco y seco.
13. Director Técnico: Gustavo Daniele – Farmacéutico – MN 13086
14. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-647-283
15. Condición de venta: Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

  
PROPATO HNOS. S.A.I.C.  
PABLO GÓMEZ CARATTO  
APODERADO

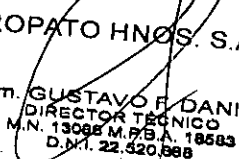
  
PROPATO HNOS. S.A.I.C.  
Farm. GUSTAVO F. DANIELE  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.N. 13086 M.P.B.A. 18583  
D.N.I. 22.520.988





Equipamiento e Insumos Hospitalarios

Av. Rodríguez Peña 2045 - B1676BUO - Santos Lugares - Bs. As.  
Teléfono: 011-4757-9064 (L.Rot.) - Fax: 54-11-4757-0276 / 2708  
web: www.propato.com.ar - e-mail: propato@propato.com.ar

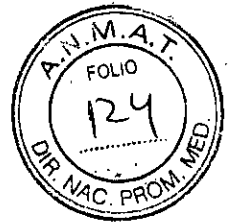

## INSTRUCCIONES DE USO

### Acciones preliminares:

Luego de controlar que el envase esté libre de daños, chequear el electrodo y el gel. No utilizar en caso de daños o defectos visibles.

Abrir el envase inmediatamente antes de su uso.

Para utilizar el lápiz para electrocirugía se debe proceder de la siguiente manera:

1. Conectar al generador de alta frecuencia:

- a. La placa neutra (electrodo de retorno) a través de un cable de conexión adecuado.
- b. El interruptor de pedal (para modelos con mango a pedal).
- c. El conector del cable del mango (para modelos con electro activo).

2. Impedir que el cable activo este directamente en contacto con la piel del paciente y que se enrede.

3. Para la verificación preliminar del funcionamiento del mango proceder de la siguiente manera:

- a. Quitar el film protector y fijar la placa neutra al paciente en superficies musculares bien vascularizadas (brazo, muslo). Comenzar desde un lado y continuar con la misma presión hasta el lado opuesto. Asegurarse que la superficie completa del electrodo esté en contacto con la piel del paciente. Evitar el contacto excesivo entre los dedos y el adhesivo. No tocar el gel.
- b. Conectar el lápiz para electrocirugía a través del cable conector.
- c. Encender el lápiz para electrocirugía y seleccionar la salida a 0 en las funciones de corte/coagulación.
- d. Sujetar el mango lejos de las personas y objetos, y apretar el botón CUT. Verificar que el lápiz para electrocirugía señale la función CUT.
- e. Repetir el punto (d.) para la verificación de la función COAG, apretando el botón COAG.

4. Una vez verificado el correcto funcionamiento del lápiz para electrocirugía, proceder a utilizarlo en el paciente de acuerdo a las necesidades de corte y/o coagulación.

5. Luego de su uso, desconectar todos los cables y desechar todo, procediendo de acuerdo a los protocolos de la unidad hospitalaria.

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

PABLO GÓMEZ CARATTO  
AFODERADO

PROPATO HNOS. S.A.I.C.


Farm. GUSTAVO F. DANIELE  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.N. 13008 M.P.B.A. 78583  
D.N.I. 22.620.860





Equipamiento e Insumos Hospitalarios

Av. Rodríguez Peña 2045 - B1676BUO - Santos Lugares - Bs. As.  
Teléfono: 011 -4757-9064 (L.Rot.) - Fax: 54-11-4757-0276 / 2708  
web: www.propato.com.ar - e-mail: propato@propato.com.ar

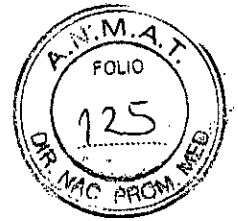

### Especificaciones del equipo alta frecuencia electroquirúrgico (generador)

Para que los mismos sean compatibles deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- Frecuencia: 625kHz±5%
- Modulación de la frecuencia: 25kHz±5%
- Poder de la fuente: AC220V-240V 50Hz±2%.
- El modo de trabajo, el rango del poder de la salida y el pico máximo de salida en voltaje se muestra en la siguiente tabla:

Performance Modo De trabajo	Poder de carga a la salida		Pico máximo de salida
	Rango de potencia de salida	Carga del equipo	
Corte puro unipolar	10-350W	500	3000V
Corte mixto unipolar	10-250W	500	3000V
Brillo eléctrico monopolar	10-200W	500	3000V
Coagulación eléctrica monopolar	10-200W	500	3000V

### **CONTRAINDICACIONES**

En pacientes con marcapasos o con desfibrilador cardioversor implantable (DCI), ya que el generador electroquirúrgico puede interferir con los circuitos de los dispositivos.

En pacientes con inflamación, embarazo, malignidad patológica adjunta no resuelta o inaccesible.

Contraindicado para su uso en procedimiento de ligadura de trompas.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

No conecte ningún dispositivo cuando el generador electroquirúrgico esté encendido. El usuario o el paciente pueden resultar heridos.

Debe evitar que el cable del mango entre en contacto con el paciente u otro cable conductor.

No utilice el equipo cuando exceda la tensión nominal. El usuario o el paciente pueden resultar heridos y el electrodo puede dañarse.

No reutilizar ni volver a esterilizar. La reutilización puede provocar pérdida de las características funcionales y el rendimiento no podrá garantizarse. Puede provocar lesiones en el paciente o daños en la unidad electroquirúrgica.

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

PABLO GÓMEZ CARATTO  
APODERADO

PROPATO HNOS. S.A.I.C.


Farm. GUSTAVO F. DANIELE  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.N. 13088 M.P.B.A. 18683  
D.N.I. 22.520.088





Equipamiento e Insumos Hospitalarios

Av. Rodríguez Peña 2045 - B1676BUO - Santos Lugares - Bs. As.  
Teléfono: 011-4757-9064 (L.Rot.) - Fax: 54-11-4757-0276 / 2708  
web: www.propato.com.ar - e-mail: propato@propato.com.ar

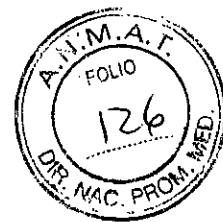

### POSIBLES CAUSAS DE QUEMADURAS

Este producto has sido desarrollado utilizando materiales que reducen el calentamiento y por lo tanto el riesgo de quemaduras al mínimo.

Las quemaduras pueden ser causadas por una alta densidad de corriente en la piel del paciente, o por el calentamiento de los fluidos o gases inflamables; las causas pueden ser las siguientes:

- 1) Mala elección del área de aplicación y preparación del paciente
- 2) El electrodo no se encuentra bien colocado (baja adherencia, presencia de burbujas de aire) o ha sido colocado al revés.
- 3) El paciente ha sido inadvertidamente posicionado en contacto con las partes eléctricamente conductivas
- 4) Ha habido un contacto directo entre los cables y la piel del paciente que ha provocado un efecto capacitante
- 5) La combustión de agentes desinfectantes inflamables
- 6) La combustión de gases narcóticos inflamables.

### **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

Almacenar en lugar limpio, seco, protegido de la luz solar y extremos de temperatura.

La temperatura requerida para su almacenamiento es de -5°C a 40°C y a una humedad relativa  $\leq 98\%$ .

### **FORMA DE PRESENTACION**

- Lápiz para electrocirugía: Una unidad/ Una unidad con cartuchera/ Una unidad con cable para placas/ Una unidad con limpiadores de puntas de electrobisturí/ Una unidad con placa paciente /Una unidad con puntas para electrobisturí.

- Cable para placa paciente: Una unidad.

- Placa paciente: Una unidad.

### **PERIODO DE VIDA UTIL**

3 años para el lápiz electroquirúrgico.

2 años para las placas para paciente.

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

PABLO GÓMEZ CARATTO  
APODERADO

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

Farm. GUSTAVO F. DANIELE  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.N. 13068 M.P.S. N. 18663  
D.N.I. 22.020.000







República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** 1-47-3110-7453-18-6 PROPATO HNOS S.A.I.C

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.01.30 14:08:21 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.01.30 14:07:58 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-47-3110-7453-18-6

---

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente N°: 1-47-3110-7453-18-6

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por PROPATO HNOS. S.A.I.C., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Instrumental para Electrocirugía

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-229 Unidades para Electrocirugía, Monopolares

Marca de los productos médicos: ALISON, AS, ATHILA, AUDAX, AUSTER, BIOSHIELD, CLIN, CLYSTER, CONSORTIUM, CORONATION, CYRUX, DARLING, DEXAL, DUBBLE, DUKE, EMAX, FLAVIA, FUREY, GUANTA, HAND, INNOVO, JAXA, KEY, KEYDENT, K KAUTION, MERCOMED, NEOJET, NEOMED, PRILLI, PRINTEX, PROPATO, PROVEIN, PS ANESTHESIA, QUANTUS, RADIATOR, SIPRO, SUNRAY, TODOSAN, TOPSAL, TRUX, UNO, VISCONT

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Para el corte de tejidos y la coagulación mediante la utilización de un generador electroquirúrgico de alta frecuencia.

Modelo/s: a) Lápiz/Mango para Electrocirugía para uso de mano (HC-EP1 series) o de pie (HC-EP2 series), b) con botonera tipo elíptica (HC-EP1-A), con botón tradicional (HC-EP1-B) o con botón tipo rocket (HP-EP1-C).  
Accesorios: a) Cartuchera para mango para electrobisturí (HC-EPP2-A), b) Cables con diferentes tipos de conectores, diámetros y largos (HC-L1-L2-L3 series, c) Limpiadores de puntas de electrobisturí (HC-EPP3-A), d) Placas paciente para electrobisturí, con o sin cable incorporados, de 1 parte o 2 partes, y en diferentes tamaños (adulto, pediátrico, neonatal) (HC-NE1-1A/ HC-NE1-1B/ HC-NE1-2A/ HC-NE1-2B/ HC-NE2-1A/ HC-NE2-1B/

HC-NE2-2A/ HC-NE2-2B/ HC-NE3-1A/ HC-NE3-1B/ HC-NE3-2A/ HC-NE3-2B), e) Puntas para electrobisturí (HC-EPP1-A/HC-EPP1-B/HC-EPP1-C)

Período de vida útil: Lápiz para Electrocirugía: tres (3) años, cable para placa paciente: tres (3) años, placa paciente: dos (2) años

Forma de presentación: Lápiz para Electrocirugía: Una unidad/ Una unidad con cartuchera/ Una unidad con cable para placas/ Una unidad con limpiadores de puntas de electrobisturí/ Una unidad con placa paciente/ Una unidad con puntas para electrobisturí.

Cable para placa paciente: Una unidad.

Placa paciente: Una unidad.

Condición de venta: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Jinhua Huacheng Medical Appliance Co., Ltd.

Lugar/es de elaboración: No.186 Qingyu Road Jindong Industrial Park Jinhua City 321000, Zhejiang, China.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 647-283, con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-47-3110-7453-18-6