



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-001563-22-1

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-001563-22-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones CORCAST S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca CORCAST, CAFAVI nombre descriptivo SISTEMA DE PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA y nombre técnico Prótesis, de Articulación, para Cadera, Totales , de acuerdo con lo solicitado por CORCAST S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento GEDO N° IF-2023-08195889-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 2351-2 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º.

Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 2351-2

Nombre descriptivo: SISTEMA DE PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-150 Prótesis, de Articulación, para Cadera, Totales

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CORCAST, CAFAVI

Modelos:

CODIGO DESCRIPCION

IMPLANTES

T092 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 7.5 mm.
T093 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 10 mm.
T094 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 12.5 mm.
T095 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 15 mm.
T096 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 17.5 mm.
T097 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 20 mm.
T098 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 42
T099 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 44
T100 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 46
T101 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 48
T102 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 50
T103 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 52
T104 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 54
T105 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 56
T106 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 58
T107 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 60
T108 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 44
T109 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 50
T110 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 54
T111 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 42
T112 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 46
T113 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 48
T114 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 52
T115 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 56
T116 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 58
T117 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 60
T118 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.42
T119 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.44
T120 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.46
T121 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.48
T122 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.50
T123 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.52
T124 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.54
T125 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.56
T126 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.58
T127 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.60
T128 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 42
T129 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 44
T130 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 46
T131 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 48
T132 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 50
T133 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 52
T134 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 54
T135 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 56
T136 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 58
T137 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello corto

T138 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello mediano
 T139 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello largo
 T140 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO -6° diam.10/12mm-Std
 T141 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO -6° diam.10/12mm-Std-Desplaz.40mm.
 T142 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Fina-Espesor.8mm
 T143 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Gruesa-Espesor 9.5mm.
 T144 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO -6° diam. 10/12mm - Pequeña -
 T145 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Std aletada-Desp.40mm
 T146 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVIS.-tallo largo
 T147 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.35mm.
 T148 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.40mm.
 T149 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.45mm.
 T150 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-Extra ref.-Desp.40mm.
 T151 PROT.CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.-Desp.40mm.
 T152 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello corto
 T153 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano
 T154 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo
 T155 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XL
 T156 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XXL
 T157 CABEZA MODULAR Diametro 22mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello corto
 T158 CABEZA MODULAR Diametro 22mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano
 T159 CABEZA MODULAR Diametro 22mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo
 T160 CABEZA MODULAR Diametro 22 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XL
 T161 CABEZA MODULAR Diametro 22 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XXL
 T162 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello corto
 T163 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo
 T164 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano
 T165 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XL
 T166 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XXL
 T167 CABEZA MODULAR Diametro 36 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello corto
 T168 CABEZA MODULAR Diametro 36 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo
 T169 CABEZA MODULAR Diametro 36 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano
 T170 CABEZA MODULAR Diametro 36 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XL
 T171 CABEZA MODULAR Diametro 36 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XXL
 T172 COTILO CHARNLEY diam.int.22mm.-PPL-Excentrico-Aletado-d.ext.35mm.
 T173 COTILO CHARNLEY diam.int.22mm. - PPL - Diam. ext. 44 mm.
 T174 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Diam. ext. 44 mm.
 T175 COTILO CHARNLEY diam.int.22mm. - PPL - Diam. ext. 40 mm.
 T176 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Diam. ext. 40 mm.
 T177 COTILO CHARNLEY diam.int.22mm. - PPL - Diam. ext. 50 mm.
 T178 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Diam. ext. 50 mm.
 T179 COTILO CHARNLEY diam.int.22 mm.-PPL-Chico s/borde dentado-d.ext.40mm.
 T180 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-CROSSLINK-Diam.ext.ext. 44 mm.
 T181 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-CROSSLINK-Diam.ext.ext. 40 mm.
 T182 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-CROSSLINK-Diam.ext.ext. 50 mm.
 T183 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-Aletado-diam. ext. 50 mm.

T184 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-Aletado-diam. ext. 44 mm.
T185 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-Aletado-diam. ext. 40 mm.
T186 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 50 mm.
T187 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 44 mm.
T188 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 40 mm.
T189 COTILO CHARNLEY diam.int. 32 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 50 mm.
T190 COTILO CHARNLEY diam.int. 32 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 44 mm.
T191 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-CROSSLINK-Alet.-diam.ext.50mm
T192 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-CROSSLINK-Alet.-diam.ext.44mm.
T193 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-CROSSLINK-Alet.-diam.ext.40mm.
T194 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm.-PPL-CROSSLINK-Alet.-diam.ext.50mm
T195 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm.-PPL-CROSSLINK-Alet.-diam.ext.44mm.
T196 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm.-PPL-CROSSLINK-Alet.-diam.ext.40mm.
T197 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.- AUTORRET-Aletado-diam.ext.50mm.
T198 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.- AUTORRET-Aletado-diam.ext.44mm.
T199 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.- AUTORRET-Aletado-diam.ext.40mm.
T200 TALLO TCCR 12/14 STANDARD TO
T201 TALLO TCCR 12/14 STANDARD T1
T202 TALLO TCCR 12/14 STANDARD T2
T203 TALLO TCCR 12/14 STANDARD T3
T204 TALLO TCCR 12/14 STANDARD T4
T205 TALLO TCCR 12/14 STANDARD T5
T206 TALLO TCCR 12/14 OFF SET TO
T207 TALLO TCCR 12/14 OFF SET T1
T208 TALLO TCCR 12/14 OFF SET T2
T209 TALLO TCCR 12/14 OFF SET T3
T210 TALLO TCCR 12/14 OFF SET T4
T211 TALLO TCCR 12/14 OFF SET T5
T212 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 40 mm
T213 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 43 mm
T214 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 46 mm
T215 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 49 mm
T216 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 52 mm
T217 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 55 mm
T218 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 58 mm
T219 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 61 mm
T220 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 40 mm
T221 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 43 mm
T222 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 46 mm
T223 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 49 mm
T224 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 52 mm
T225 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 55 mm
T226 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 58 mm
T227 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 61 mm
T228 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 40 mm
T229 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 43 mm

T230 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 46 mm
 T231 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 49 mm
 T232 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 52 mm
 T233 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 55 mm
 T234 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 58 mm
 T235 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 61 mm
 T236 CABEZA MODULAR Diametro 22 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +0
 T237 CABEZA MODULAR Diametro 22 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +4
 T238 CABEZA MODULAR Diametro 22 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +8
 T239 CABEZA MODULAR Diametro 22 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +12
 T240 CABEZA MODULAR Diametro 26 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +0
 T241 CABEZA MODULAR Diametro 26 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +4
 T242 CABEZA MODULAR Diametro 26 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +8
 T243 CABEZA MODULAR Diametro 26 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +12
 T244 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello -3
 T245 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +0
 T246 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +4
 T247 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +8
 T248 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +12
 T249 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +16
 T250 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello -3
 T251 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +0
 T252 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +4
 T253 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +8
 T254 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +12
 T255 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +16
 T256 TCCR CENTRALIZADOR DISTAL
 T257 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 39 mm.
 T258 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 41 mm.
 T259 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 43 mm.
 T260 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 45 mm.
 T261 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 47 mm.
 T261 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 49 mm.
 T263 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 51 mm.
 T264 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 53 mm.
 T265 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 55 mm.
 INSTRUMENTAL
 0001 Charnley Monoblock Instrumental complementario Pinza para capitones -
 0002 Charnley Monoblock Instrumental complementario Cureta de anillo -
 0003 Charnley Monoblock Instrumental complementario Cureta raspa -
 0004 Charnley Monoblock Instrumental complementario Cureta chica -
 0005 Charnley Monoblock Instrumental complementario Cureta mediana -
 0006 Charnley Monoblock Instrumental complementario Cureta grande -
 0007 Charnley Monoblock Instrumental complementario Elevador Hohmann a 45°
 0008 Charnley Monoblock Instrumental complementario Separador de Hohmann -
 0009 Charnley Monoblock Instrumental complementario Separador Morris -

0010 Charnley Monoblock Instrumental complementario Separador Ollier -
0011 Charnley Monoblock Instrumental complementario - CAJA ACERO INOX
0012 Charnley Monoblock Instrumental complementario - BASTIDORES
0013 Charnley Monoblock Instrumental complementario - CAJA ACERO INOX MODULAR -
0014 Charnley Monoblock Instrumental complementario - BASTIDORES MODULAR -
0015 Charnley Monoblock Vastago femoral Repuesto cabeza de impactor (teflon)
0016 Charnley Monoblock Vastago femoral Davier Trocanter -
0017 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6°10/12mm Pasa sierra (juego de 2)
0018 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6°10/12mm Separador de de cuadro
0019 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm palanca Waston Jones
0020 Charnley Monoblock Vastago femoral Elevador femoral Charnley -
0021 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Separad.autoest.horiz.
0022 Charnley Monoblock Vastago femoral Separador autoestático vertical -
0023 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Mangos p/sierra de Gigli
0024 Charnley Monoblock Vastago femoral Berbiqui para fresas trocanter
0025 Charnley Monoblock Vastago femoral Fresa cónica para canal medular
0026 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Fresa cónica mango en "T"
0027 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Raspa Recta
0028 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Raspa Curva -
0029 Charnley Monoblock Vastago femoral Implantador de Protesis Femoral -
0030 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Impac.cabeza de teflon
0031 Charnley Monoblock Vastago femoral Pinza autoestatica para alambre -
0032 Charnley Monoblock Vastago femoral Mechas diametro 3.5mm (2) -
0033 Charnley Monoblock Vastago femoral Pasa alambre -
0034 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Estribo Kirschner
0035 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 90-40 -
0036 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 70-E -
0037 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 68-ME -
0038 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 91-40 -
0039 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 71-H1 -
0040 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 72-H2 -
0041 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 92-40 -
0042 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 73-H3 -
0043 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 74-H4 -
0044 Charnley Monoblock Instrumental complementario-IMPACTOR COLA DE PESCADO
0045 Charnley Monoblock Instrumental complementario-PROTESIS DE PRUEBA 93-40.
0046 Charnley Monoblock Instrumental complementario-IMPACTOR CON PUNTA PLANA
0047 Charnley Monoblock Instrumental complementario-RETRACTOR HORIZONTAL C/TORN.
0048 Charnley Monoblock Instrumental complementario-TALADRO P/MECHAS Y FRESAS
0049 Charnley Monoblock Vastago femoral - Raspa bayoneta izquierda - CURVA
0050 Charnley Monoblock Vastago femoral - Raspa bayoneta derecha - CURVA
0051 Charnley Monoblock Vastago femoral - Raspa bayoneta izquierda - RECTA
0052 Charnley Monoblock Vastago femoral - Raspa bayoneta derecha - RECTA
0053 Charnley Monoblock Componente acetabular Mecha para centrado y anclaje
0054 Charnley Monoblock Componente acetabular Mango "T" manual p/fresa canastilla
0055 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø38 a 58mm

0056 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 40mm -
0057 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 42mm -
0058 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 44mm -
0059 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 46mm -
0060 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 48 mm. -
0061 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 50 mm. -
0062 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 52 mm. -
0063 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 54 mm. -
0064 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 56 mm. -
0065 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 58 mm. -
0066 Charnley Monoblock Componente acetabular Acople de fresa para taladro -
0067 Charnley Monoblock Componente acetabular Acople de fresa para motor -
0068 Charnley Monoblock Componente acetabular Mango para cartabon -
0069 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab.40mm.
0070 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab.44mm.
0071 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab.50mm.
0072 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab.54mm.
0073 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Clavijas -
0074 Charnley Monoblock Vast.femoral cuello 6°10/12mm Extractor-Impactor de clavijas
0075 Charnley Monoblock Componente acetabular Mechass de 6 mm. con tope -
0076 Charnley Monoblock Componente acetabular Guia p/cotilo c/expulsor 22mm
0077 Charnley Monoblock Componente acetabular Empujador de copa -
0078 Charnley Monoblock Componente acetabular Empujador de copa modificado -
0079 Charnley Monoblock Componente acetabular Guia p/cotilo c/expulsor 28mm
0080 Charnley Monoblock VALVAS PARA OBESOS
0081 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab. 42mm
0082 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab. 46mm
0083 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab. 48mm
0084 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab. 52mm
0085 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab. 56mm
0086 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab. 58mm
0087 Charnley Monoblock Vastago femoral - Raspa recta fina (75R)
0088 Charnley Conico Instrumental complementario Gancho Lambotte -
0089 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Extractor para cabeza intercambiable -
0090 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Porta protesis para C.CONICO -
0091 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 90-40-Z26
0092 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 70-E-Z26
0093 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 68-ME-Z26
0094 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 91-40-Z26
0095 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 71-H1-Z26
0096 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 72-H2-Z26
0097 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 92-40-Z26
0098 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 73-H3-Z26
0099 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 74-H4-Z26
0100 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Cabeza prueba Ø 22.22mm.-c.corto
0101 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Cabeza prueba Ø 22.22mm.-c.med.

0102 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Cabeza prueba Ø 26mm.-c.corto
0103 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Cabeza prueba Ø 26mm.-c.med.
0104 Copa Bipolar Componente acetabular Mango porta probador -
0105 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.39mm. -
0106 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.41mm. -
0107 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.43mm. -
0108 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.45mm. -
0109 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.47mm. -
0110 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.49mm. -
0111 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.51mm. -
0112 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.53mm. -
0113 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.55mm. -
0114 BASTIDOR BIPOLAR -
0115 CAJA ACERO INOX BIPOLAR -
0116 Descementacion Vastago femoral- GUBIA V POSITIVA
0117 Descementacion Vastago femoral- GUBIA V NEGATIVA ANGOSTA
0118 Descementacion Vastago femoral Escoplo recto -
0119 Descementacion Vastago femoral- GUBIA RECTA
0120 Descementacion Vastago femoral- GUBIA CURVA MEDIA
0121 Descementacion Vastago femoral Tirabuzon -
0122 Descementacion Vastago femoral Gancho -
0123 Descementacion Vastago femoral Mecha diametro 8mm. -
0124 BASTIDOR DESCEMENTACION -
0125 CAJA ACERO INOX DESCEMENTACION -
0126 Descementacion Vastago femoral- GUBIA CURVA ALTA
0127 Descementacion Vastago femoral- GUBIA INCLINADA CON CUERPO CURVO
0128 Descementacion Vastago femoral- GUBIA V NEGATIVA ANCHA
0129 Descementacion Vastago femoral- MACHO ROSCADOS Ø8MM
0130 Descementacion Vastago femoral- MACHO ROSCADOS Ø10MM
0131 Descementacion Vastago femoral- MACHO ROSCADOS Ø12MM
0132 Descementacion Vastago femoral- MACHO ROSCADOS Ø12MM CONICO
0133 Descementacion Vastago femoral- ESCOPLO “T”
0134 Descementacion Vastago femoral- ESCOPLO BANDERA
0135 Descementacion Vastago femoral- ESCOPLO “X” CURVO CABEZA CORTA
0136 Descementacion Vastago femoral- COMPACTADOR DE HUESO
0137 Descementacion Vastago femoral- CUCHARA ACETABULAR
0138 Descementacion Vastago femoral- CURETA INVERTIDA ANCHA
0139 Descementacion Vastago femoral- CURETA INVERTIDA MEDIA
0140 Descementacion Vastago femoral- CURETA INVERTIDA CHICA
0141 Descementacion Vastago femoral- ESCOPLO “T” CURVO CABEZA CORTA
0142 Descementacion Vastago femoral- ESCOPLO “T” CURVO CABEZA LARGA
0143 Descementacion Vastago femoral- MARTILLO EXTRACTOR
0144 Descementacion - JUEGO DE VALVAS SIMPLES
0145 Descementacion - ESCOPLO RECTO LARGO 40 CM, PUNTA PLANA Y PUNTA CONCAVA
0146 Descementacion - CORTA ALAMBRE
0147 Descementacion - MECHA LARGA 40 CM, DIAM. 6 MM

0148 Descementacion - MECHA LARGA 40 CM, DIAM. 10 MM
0149 Descementacion - FRESAS DE BOLITA 4 MM DE DIAMETRO, LARGO 40 CM
0150 Descementacion - FRESAS DE BOLITA 6 MM DE DIAMETRO, LARGO 40 CM
0151 Descementacion - FRESAS DE BOLITA 8 MM DE DIAMETRO, LARGO 40 CM
0152 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 28 mm Long cuello -3 mm
0153 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 28 mm Long cuello 0 mm
0154 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 28 mm Long cuello +4 mm
0155 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 28 mm Long cuello +8 mm
0156 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 28 mm Long cuello +12 mm
0157 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 28 mm Long cuello +16 mm
0158 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 32 mm Long cuello -3 mm
0159 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 32 mm Long cuello 0 mm
0160 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 32 mm Long cuello +4 mm
0161 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 32 mm Long cuello +8 mm
0162 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 32 mm Long cuello +12 mm
0163 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 32 mm Long cuello +16 mm
0164 TCCR Cuello de prueba TALLO 0 C/ CUELLO STANDARD
0165 TCCR Cuello de prueba TALLO 1 y 2 C/ CUELLO STANDARD
0166 TCCR Cuello de prueba TALLO 3,4 y 5 C/ CUELLO STANDARD
0167 TCCR Cuello de prueba TALLO 0 C/ CUELLO DESPLAZADO
0168 TCCR Cuello de prueba TALLO 1 y 2 C/ CUELLO DESPLAZADO
0169 TCCR Cuello de prueba TALLO 3,4 y 5 C/ CUELLO DESPLAZADO
0170 TCCR Guía de osteotomía 0-5
0171 TCCR Mango de brocha
0172 TCCR Caja de Cíncel
0173 TCCR Mango de anteversión
0174 TCCR Fresa trocanter
0175 TCCR Impactador de cabeza femoral
0176 TCCR Fresa Medular
0177 TCCR Sonda Femoral 8-9 mm
0178 TCCR Sonda Femoral 10-11 mm
0179 TCCR Sonda Femoral 12-13 mm
0180 TCCR Sonda Femoral 14-15 mm
0181 TCCR Sonda Femoral 16-17 mm
0182 TCCR Sonda Femoral 18-19 mm
0183 TCCR Brochas de prueba Iniciador
0184 TCCR Brochas de prueba Talle 0
0185 TCCR Brochas de prueba Talle 1
0186 TCCR Brochas de prueba Talle 2
0187 TCCR Brochas de prueba Talle 3
0188 TCCR Brochas de prueba Talle 4
0189 TCCR Brochas de prueba Talle 5
0190 TCCR Mango de inserción
0191 TCCR Destornillador de tallo femoral
0192 TCCR Escareador Calcar chico
0193 TCCR Escareador Calcar largo

0194 TCCR Bandeja de instrumentos primaria
0195 TCCR Estuche de transporte exterior pequeño
0196 TCCR Tapa para estuche de transporte exterior
0197 TCCR Bandeja de sonido femoral
0198 TCCR Herramienta de apertura de ventilación
0199 TCCR Restrictor de cemento 18.5 mm
0200 TCCR Restrictor de cemento 25 mm
0201 TCCR Restrictor de cemento 30 mm
0202 TCCR Restrictor de cemento 35 mm
0203 TCCR Kit de escultura de cemento conciso
0204 TCCR Absorbedor de succión del canal femoral 19 mm
0205 TCCR Absorbedor de succión del canal femoral 25 mm
0206 TCCR Presurizadores femorales chico
0207 TCCR Presurizadores femorales mediano
0208 TCCR Presurizadores femorales grande
0209 TCCR Insertor del restrictor de cemento femoral
0210 TCCR Cepillo del canal femoral 19 mm
0211 TCCR Cepillo del canal femoral 12.5 mm
0212 TCCR Sistema con jeringa de mezcla al vacío
0213 TCCR Compresor de cemento femoral
0214 TCCR Tapa del Compresor de cemento femoral
0215 Muller Conico Instrum.complement. Hohmann 43mm. pico estrecho
0216 Muller Conico Instrum.complement. Hohmann 24mm.pico largo redondeado
0217 Muller Conico Instrum.complement. Hohmann 18mm.pico estrecho
0218 Muller Conico Instrum.complement. Separador Ollier para pie
0219 Muller Conico Instrum.complement. Gancho puntiagudo para hueso -
0220 Muller Conico Instrum.complement. Pesa 1250 gramos -
0221 Muller Conico Instrum.complement. Gancho para pesa -
0222 Muller Conico Instrum.complement. Brazo telescopico para pesa -
0223 Muller Conico Instrum.complement. Hohmann(angosto)22 mm. p/tejido blando
0224 Muller Conico Instrum.complement. Hohmann(ancho)43mm.p/tejido blando
0225 Muller Conico Instrum.complement. Separador Langenbeck -
0226 Muller Conico Instrum.complement. Escoplo recto -
0227 Muller Conico Instrum.complement. Escoplo curvo -
0228 Muller Conico Instrum.complement. Cureta chica de 9 mm. -
0229 Muller Conico Instrum.complement. Cureta mediana de 13 mm. -
0230 Muller Conico Instrum.complement. Cureta grande de 27 mm. -
0231 CAJA ACERO INOX MULLER MODULAR -
0232 BASTIDORES MULLER MODULAR -
0233 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Separador horquilla Muller femoral
0234 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Extractor de cabeza de femur -
0235 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Palanca p/luxar cabeza femoral
0236 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Raspa p/canal medular(autobloqueante)
0237 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Punzon impactor p/autobloqueante
0238 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Impactor cabeza de teflon -
0239 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Gubia cuello de cisne -

0240 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Gubia curva de diametro 9 mm
0241 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Gubia doble curva de diam.9 mm
0242 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Protesis prueba Muller 7,5 mm
0243 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Protesis prueba Muller 10 mm
0244 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Protesis prueba Muller 12,5 mm
0245 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Protesis prueba Muller 15 mm
0246 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Protesis prueba Muller 17,5 mm
0247 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Protesis prueba Muller 20 mm
0248 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Cabeza prueba Ø 28 mm.-c. corto
0249 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Cabeza prueba Ø 28 mm.-c. med.
0250 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Cabeza prueba Ø 28 mm.-c. largo
0251 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Cabeza prueba Ø 32 mm.-c. corto
0252 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Cabeza prueba Ø 32 mm.-c. med.
0253 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Cabeza prueba Ø 32 mm.-c. largo
0254 Muller Conico Vastago femoral - RASPA AUTOBLOQUEANTE 10 MM -
0255 Muller Conico Vastago femoral - RASPA AUTOBLOQUEANTE 12.5MM -
0256 Muller Conico Vastago femoral - RASPA AUTOBLOQUEANTE 15 MM -
0257 Muller Conico Vastago femoral - RASPA AUTOBLOQUEANTE 17.5MM -
0258 Muller Conico Vastago femoral - RASPA AUTOBLOQUEANTE 20 MM -
0259 Muller Conico Componente acetabular Guia implantadora de cotilo -
0260 Muller Conico Componente acetabular Cartabon p/impactar cotilo de 28 mm
0261 Muller Conico Componente acetabular Cartabon p/impactar cotilo de 32 mm
0262 Muller Conico Vastago femoral - CABEZA PRUEBA DIAM. 28MM. CUELLO XL
0263 Muller Conico Vastago femoral - CABEZA PRUEBA DIAM. 28MM. CUELLO XXL
0264 Muller Conico Componente acetabular Templates p/planeamiento quirúrgico
0265 Muller Conico Componente acetabular - Impactador cotilo doble cabeza 28-32mm.
0266 Muller Guia implantadora para cotilo con expulsor para diam.32mm PPL
0267 Anillo Muller Componente acetabular Acople flexible para machos -
0268 Anillo Muller Componente acetabular Acople flexible para mechas -
0269 Anillo Muller Componente acetabular Destornillador cardanico -
0270 Anillo Muller Componente acetabular Guia de mechas -
0271 Anillo Muller Componente acetabular Macho diametro 6,5 x 45 mm. -
0272 Anillo Muller Componente acetabular Mecha de diametro 3.2 mm. x 56 mm.
0273 Anillo Muller Componente acetabular Medidor de profundidad -
0274 Anillo Muller Componente acetabular Macho diametro 4,5 x 45 mm. -
0275 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 44mm.-D.ext.51mm
0276 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 46mm.-D.ext.53mm
0277 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 48mm.-D.ext.55mm
0278 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 50mm.-D.ext.57mm
0279 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 52mm.-D.ext.59mm
0280 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 54mm.-D.ext.61mm
0281 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 56mm.-D.ext.63mm
0282 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 58mm.-D.ext.65mm

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Artritis reumatoide

Espondilitis anquilosante

Enfermedad articular degenerativa (osteoartritis, enfermedad de Paget, fracturas y luxaciones traumáticas)

Necrosis vascular

Procesos de no consolidación de fracturas de cadera con afección de la cabeza femoral

Tumores óseos

Fracasos de cirugía reconstructiva

Fusión de cadera y pseudo artrosis

Subluxación congénita

Período de vida útil: 3 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Componente Cotilo (1 unidad), cabeza (1 unidad) y Tallo (1 unidad) envasados por separado.

Método de esterilización: por radiación

Nombre del fabricante:

CORCAST S.A.

Lugar de elaboración:

M.Lebensohn N°1196 – Bella Vista – Pdo. San Miguel – Provincia de Buenos

Aires – República Argentina

Expediente N° 1-0047-3110-001563-22-1

N° Identificador Trámite: 37730

AM



Anexo III.B - Disp 2318/02
Proyecto de Instrucciones de Uso
Prótesis para reemplazo total de cadera

NOTA IMPORTANTE: La presente Instrucción de Uso se utiliza para prótesis para reemplazo parcial y total de cadera. Se indica en la misma cuando la indicación es exclusiva para cada tipo de producto.

Fabricante:

CORCAST S.A.

M.Lebensohn N°1196 – Bella Vista – Pdo. San Miguel – Provincia de Buenos Aires – República Argentina - Teléfono: (011) 4765-1357 - E-mail: info@corcast.com.ar

INSTRUCCIONES DE UTILIZACION

Prótesis para reemplazo de cadera

Autorización ANMAT:

PM 2351-2: Prótesis para reemplazo total de cadera (*aplicable a este registro*)
PM 2351-3: Prótesis para reemplazo parcial de cadera (*no aplicable a este registro*)

Uso exclusivo a Profesionales e Instituciones Sanitarias

Director Técnico: Carlos Javier Otero – MP: 20.475

Instrucciones especiales, advertencias y precauciones: Referirse siempre a las instrucciones de utilización.

ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y MANIPULACIÓN: Conservar en ambiente limpio y fresco.

Producto de un solo uso – No utilizar si el envase se encuentra dañado o abierto

1- GENERALIDADES

Los productos deben ser implantados por profesionales capacitados que conocen las técnicas brindadas por CORCAST S.A. para la utilización de cada uno de ellos. La información actualizada para implantar los mismos se puede obtener a través de nuestros catálogos o bien ser requerida a nuestra empresa directamente, incluso en casos especiales.

CORCAST S.A. no se responsabiliza por cualquier efecto ni consecuencias que pudieran resultar del apartamiento de esas técnicas o instrucciones específicas, como ser una equivocada indicación o mala utilización de la técnica quirúrgica o problemas de asepsia, siendo esta enumeración no taxativa.

Los implantes han sido diseñados como un conjunto integral aunque permiten realizar variantes a condición que se respete la compatibilidad dimensional de las piezas y de los materiales. **Están garantizadas las variantes que sean realizadas con productos fabricados por CORCAST S.A.. En ningún caso podrán ser combinados con productos fabricados por otra empresa salvo aquellos autorizados exclusivamente por CORCAST S.A.. En caso de combinar productos de fabricación propia con productos no autorizados por CORCAST S.A., caducará automáticamente la garantía del producto utilizado.**

Esta u otras circunstancias deben asentarse en la historia clínica e informarse al paciente.

Estas INSTRUCCIONES DE UTILIZACION que se incluyen con el producto deben ser leídas atentamente por el médico cirujano y deben darse a conocer al paciente que recibirá el implante debiendo el médico justificar la entrega de una copia del presente y asentar dicha circunstancia en la historia clínica

Ningún implante es mejor que la articulación humana. Los implantes están fabricados de diversos biomateriales compatibles con el cuerpo humano tal como polietileno (solo para prótesis total de cadera), aleaciones de acero inoxidable, cobalto-cromo, titanio e hidroxiapatita. El peso del paciente y su nivel de actividad son factores fundamentales que afectan la vida y el desempeño del implante. El paciente DEBE ser instruido por parte del médico cirujano acerca de estos factores así como las restricciones a las que se verá sometido el paciente en la etapa postoperatoria.

Los implantes pueden fallar o presentar complicaciones en los siguientes casos:

- Pacientes con expectativas funcionales irreales.
- Pacientes de elevado peso.
- Pacientes físicamente activos.

Para mayor información por favor lea las CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y EFECTOS ADVERSOS.

2- INSTRUCCIONES DE UTILIZACION

Antes de proceder al uso del implante, es imprescindible verificar el correcto estado del envase, y en consecuencia si ha sufrido o no alteraciones la esterilización del implante.

Eduardo Coronel
Apoderado Legal

Farm. Carlos Javier Otero
Director Técnico – MP: 20.475

Hoja 1 de 6

**CorCast**

Anexo III.B - Disp 2318/02
Proyecto de Instrucciones de Uso
Prótesis para reemplazo total de cadera

En caso que el envase se encuentre abierto o deteriorado, NO IMPLANTAR y remitir de forma inmediata a CORCAST S.A.

Verificar que la fecha de vencimiento no se encuentre vencida y en su caso, proceder de igual modo que en el párrafo anterior.

Cada producto debe ser extraído en condiciones de asepsia y tratado con cuidado, de manera que no tome contacto con otros que puedan alterarlo.

IMPORTANTE: No utilizar jamás un implante que haya sido usado previamente.

No efectuar ninguna modificación al implante salvo en casos indicados por la técnica quirúrgica.

Antes de la implantación verificar que el implante no posea suciedad, marcas, golpes o rayaduras especialmente en las zonas de fricción y conos de unión.

Debe evitarse la flexión o golpe del implante en cualquier sentido.

Cualquiera de estos procedimientos puede causar el daño al acabado de su superficie, produciendo como consecuencia concentración de tensiones que pueden llegar a desprender el revestimiento superficial y ser el punto de fractura del implante.

Respecto a los detalles técnicos que conciernen la implantación propiamente dicha, el cirujano deberá referirse a la técnica quirúrgica. CORCAST S.A. cuenta con material técnico y personal capacitado que podrá asistirlo para implantar con éxito el producto.

NUNCA inicie el acto quirúrgico sin antes realizar una minuciosa planificación preoperatoria ya que la falta de planificación puede ocasionar la mala selección del componente protésico o la falla en el abordaje del área a operar.

3- INDICACIONES

- Artritis reumatoide
- Espondilitis anquilosante
- Enfermedad articular degenerativa (osteoartritis, enfermedad de Paget, fracturas y luxaciones traumáticas)
- Necrosis vascular
- Procesos de no consolidación de fracturas de cadera con afección de la cabeza femoral
- Tumores óseos
- Fracaso de cirugía reconstructiva
- Fusión de cadera y pseudo artrosis
- Subluxación congénita

Los recubrimientos de hidroxiapatita y plasma spray aplicados a superficies porosas están previstos para la artroplastia no consolidada.

4- CONTRAINDICACIONES

- Infecciones sistémicas o locales, crónicas o agudas.
- Deficiencias vasculares, musculares severas o neurológicas que afecten al miembro en cuestión.
- Destrucción ósea, pérdida o baja calidad ósea que puedan afectar la estabilidad del implante.
- Todas la infecciones asociadas que puedan comprometer la funcionalidad o implante del producto.
- Presencia de otros trastornos como cardíacos, pulmonares, metabólicos, etc.
- Pacientes que serán incapaces de movilizarse luego de la artroplastia debido a otros problemas.
- Pacientes esqueléticamente inmaduros.
- Adicción a las drogas, alcohol o fármacos.
- Artrodesis estable e indolora
- Genu Recurvatum con debilidad y parálisis muscular.

IMPORTANTE: El médico cirujano debe considerar potenciales contraindicaciones en pacientes con alteraciones neurológicas que no sean capaces de cumplir las indicaciones posquirúrgicas así como aquellos con pérdida ósea acusada, alteraciones metabólicas, úlceras, pacientes diabéticos, déficit de nutrición y déficit severo de proteínas. Todos estos factores ponen el riesgo tanto la artroplastia como la funcionalidad e integridad del implante. Los pacientes DEBEN SER ADVERTIDOS DE ESTAS CONTRAINDICACIONES

5- ADVERTENCIAS

En todos los casos, se deben seguir las prácticas habituales recomendadas por el médico cirujano luego de la cirugía. El paciente debe ser advertido de las limitaciones que implica una reconstrucción de la articulación. El riesgo de fracaso del implante que incluye entre otros aflojamiento, fractura y/o desgaste, se incrementa en

Eduardo Coronel
Apoderado Legal

Farm. Carlos Javier Otero
Director Técnico – MP: 20.475

Hoja 2 de 6

pacientes de peso elevado o altos niveles de actividad física. Los pacientes deben ser advertidos del incremento del riesgo que esto implica.

Para una utilización segura y eficiente del implante, el médico cirujano debe conocer perfectamente las técnicas quirúrgicas recomendadas para la implantación. Para asegurar una implantación segura y precisa de los implantes solamente deben utilizarse instrumentales fabricados o provistos por CORCAST S.A.. No deben utilizarse otros instrumentales no fabricados o provistos por CORCAST S.A. ya que esto puede llevar a una mala implantación de los componentes favoreciendo el fracaso acelerado del implante.

Es imprescindible realizar la planificación preoperatoria antes de la implantación para una correcta selección de los componentes. Esta tarea es absoluta responsabilidad del médico cirujano y por lo tanto CORCAST S.A. no puede recomendar la utilización de componentes protésicos ni de la técnica quirúrgica pero pone a disposición de los profesionales los distintos tipos implantes así como las diferentes técnicas quirúrgicas aplicables a los mismos.

Biomateriales: Para la fabricación e implantación de los implantes se han utilizado biomateriales compatibles química, biológica y físicamente con el cuerpo humano así como mecánicamente resistentes a las cargas que el mismo transmite a los implantes. Sin embargo, en el caso de las aleaciones metálicas, estas poseen elementos constitutivos que pueden provocar respuesta de hipersensibilidad alérgica del sistema inmunológico. Si se sospecha durante el estudio preoperatorio la existencia del fenómeno en el paciente, es indispensable realizar el diagnóstico apropiado, con el fin de seleccionar correctamente el implante y en particular su composición.

Los materiales con que han sido fabricados los implantes están estandarizados por normas IRAM, ISO y ASTM. La norma correspondiente al material de cada componente se encuentra descripta en la etiqueta que acompaña el mismo. CORCAST S.A. pone a disposición del profesional la nómina de normas de biomateriales para determinar la composición de cada componente protésico.

La presurización del cemento óseo (Polimetilmetacrilato – PMMA) puede incrementar la presión extravascular por lo tanto el riesgo de embolismos clínicamente significativos se incrementa. La incorrecta aplicación del cemento puede generar un deficiente fraguado del mismo y una reducción de las propiedades de resistencia mecánica del mismo. Se recomienda limpiar perfectamente bien la región ósea a cementar eliminando restos de coágulos, grasa y partículas óseas ya que la inclusión de las mismas debilitan notablemente la resistencia mecánica del cemento óseo. De igual forma se debe prestar atención durante el preparado del cemento antes de aplicarlo ya que la inclusión de burbujas de aire en la composición, debilitan la resistencia final del cemento óseo. Una vez fijados los componentes protésicos, retirar los restos remanentes de cemento y partículas óseas y cuidar especialmente que las superficies de contacto articular se encuentren libres de partículas que puedan acelerar el proceso de desgaste y favoreciendo el fracaso protésico.

IMPORTANTE (solo para prótesis total de cadera): En el caso de la utilización de tornillos para fijación de componentes acetabulares, debe seleccionarse cuidadosamente la cantidad, longitud y posición de los mismos. La incorrecta selección y posición de los mismos puede llegar a comprometer seriamente la salud del paciente pudiendo causar la muerte del mismo. Asegurar que una vez roscados, la cabeza de los tornillos se encuentre totalmente embutida en el anillo acetabular.

Aplicación no cementada. La fijación adecuada en el momento de la intervención es de vital importancia para el éxito del procedimiento. Las copas acetabulares y los vástagos femorales sin cementar deben ajustarse a presión en el hueso anfitrión, lo que exige una técnica quirúrgica precisa y el uso de instrumentos específicos. Durante el asentamiento de la prótesis puede producirse la fractura intraoperatoria del fémur o el acetábulo. Debe existir una adecuada cantidad de hueso para sostener el dispositivo.

Tornillos de fijación acetabular (solo para prótesis total de cadera). Debe evitarse totalmente la perforación de la pelvis con tornillos de fijación de la cúpula o tornillos con reborde. Debe determinarse y seleccionarse con cuidado la longitud adecuada de los tornillos a utilizar. La perforación de la pelvis con tornillos demasiado largos puede romper vasos sanguíneos y provocar una hemorragia al paciente.


Revestimiento/copa acetabular modular (solo para prótesis total de cadera). Los tornillos de fijación, cuando se usen, deben asentarse por completo para garantizar la fijación estable de la copa, y evitar interferencias con el componente de revestimiento. Antes de la implantación, asegúrese de que la copa y el revestimiento seleccionados sean compatibles. Antes de asentar el componente de revestimiento en el componente de copa, deben limpiarse los restos quirúrgicos del interior de la copa y ésta debe secarse por completo. Los restos y los líquidos pueden impedir la fijación del revestimiento en el componente de copa. Si no se asienta adecuadamente el revestimiento en la copa, se puede producir la disociación del revestimiento y la copa.

6- PRECAUCIONES

El paciente debe ser advertido de las limitaciones que implica un reemplazo articular. El médico cirujano debe advertir al paciente respecto de los cuidados y controles a los que debe someterse una vez implantado. El



Eduardo Coronel
Apoderado Legal

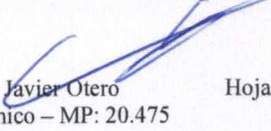

Farm. Carlos Javier Otero
Director Técnico – MP: 20.475

Hoja 3 de 6

nivel de actividad física excesiva del paciente así como el sobrepeso afectan en forma directa la zona implantada y comprometen la fijación y durabilidad del implante. El aflojamiento de cualquiera de los componentes protésicos puede dar lugar a la fractura del mismo o a la generación excesiva de partículas producto del rozamiento pudiendo generar una reacción tisular de resorción ósea y favoreciendo al fracaso del reemplazo articular.

Un implante nunca debe ser reutilizado. La remoción y reinserción durante la cirugía puede generar en cualquiera de los componentes daños imperceptibles que generen concentración de tensiones o daños a las superficies de rozamiento que reducen la vida útil del implante.

En los casos de conos de unión, los mismos han sido fabricados utilizando tolerancias muy estrictas. Deben manipularse con especial cuidado evitando que los mismos se golpeen, rayen o deterioren ya que generan en la unión imperfecciones que conllevan al fracaso de los componentes. Limpiar los conos de unión antes de ensamblarlos durante la cirugía ya que si quedan partículas de cemento ó restos óseos en alguno o ambos componentes puede generar el fracaso de los componentes. Nunca utilizar componentes de distintos fabricantes ya que las dimensiones de los conos entre distintos fabricantes pueden diferir.

Los componentes para uso sin cemento con revestimiento superficial de hidroxiapatita (HA) o plasma spray deben ser resguardados de cualquier contacto previo con tejidos o fluidos biológicos ya que esto puede generar la disminución de la capacidad de adhesión de la superficie del implante al hueso. En caso que el componente tome contacto con algún tejido o fluido ajeno, el mismo deberá ser descartado en forma inmediata.

Manipule siempre el producto con guantes sin polvo y evite el contacto con objetos duros que puedan dañarlo. Esto es especialmente importante durante la manipulación de prótesis con revestimiento poroso y prótesis con revestimiento de HA.

Evite que las superficies porosas o de HA entren en contacto con paños u otros materiales que suelten fibra.

Una vez implantado el paciente, se debe resguardar al mismo de cualquier infección posterior, por insignificante que se la considere ya que la zona implantada queda susceptible durante un período de tiempo de contraer infección haciendo fracasar la artroplastia. Ante cualquier síntoma de infección consultar al médico cirujano para aplicar el tratamiento farmacológico más adecuado. De igual forma se debe instruir al paciente de estos riesgos asociados a infecciones así como el paciente debe informar al médico cirujano ante cualquier cirugía posterior a la implantación (p.ej: tratamientos dentales, exámenes endoscópicos, etc.) para prevenir la potencial infección de la zona implantada.

7- EFECTOS ADVERSOS

Durante la implantación de cualquiera de los componentes protésicos, puede ocurrir la fractura del hueso si es que los componentes no han sido seleccionados adecuadamente o bien no se ha empleado correctamente la técnica quirúrgica.

La implantación de materiales extraños en los tejidos puede ocasionar reacciones histológicas involucrando macrófagos y fibroblastos. La significación clínica actual de estos efectos es incierta dado que cambios similares pueden ocurrir durante el proceso normal de curado de la herida.

Reacciones de sensibilidad de los pacientes a las bioaleaciones siguientes al reemplazo articular raramente han sido reportadas. La infección del sitio implantado puede ser seria y debe ser tratada de forma inmediata ya que de no ser así puede llevar a la amputación del miembro afectado.

Algunos de estos efectos adversos pueden requerir una nueva cirugía, la remoción del implante y la posterior implantación de un nuevo implante.

Adicionalmente al riesgo asociado de falla del implante, ausencia de adhesión, aflojamiento o fractura, los siguientes riesgos a respuestas tisulares adversas y posibles complicaciones DEBEN ser explicadas y discutidas con el paciente:

- Se han presentado reportes en la literatura que una variedad de metales, polímeros y químicos y otros materiales utilizados en ortopedia pueden causar cáncer u otras reacciones adversas. Debido al largo período de latencia requerido para inducir tumores en humanos, no existe evidencia concluyente de la relación entre los implantes ortopédicos y los tumores malignos. Aunque no se ha establecido una clara asociación, los riesgos e incertidumbres de los efectos a largo plazo de las articulaciones artificiales y los elementos de fijación, DEBEN ser explicadas y discutidas con el paciente con anterioridad a la cirugía. El paciente debe saber que cualquier condición que cause daño crónico a los tejidos, puede ser oncogénico. Cáncer hallado en las inmediaciones del implante puede estar asociado a factores no referidos a los materiales del implante tal como: metástasis de los tejidos blandos (pulmones, pecho, sistema digestivo y otros) al hueso o inducido en estas localizaciones durante el proceso operativo o por procesos de diagnóstico tal como biopsias y por avance de la enfermedad de Paget. Los pacientes que sufren la enfermedad de Paget deben ser advertidos de estos efectos.

Eduardo Coronel
Apoderado Legal

Farm. Carlos Javier Otero
Director Técnico – MP: 20.475

Hoja 4 de 6

- La implantación de cualquier material extraño en los tejidos puede dar lugar a procesos inflamatorios. Literatura reciente sugiere que las partículas producto del desgaste (incluyendo metales, cerámicos, polímeros y restos de cemento óseo) pueden iniciar el proceso de aflojamiento del implante. Dado que la generación de partículas de desgaste es inevitable para el movimiento de la articulación, debe asegurarse que se emplean las técnicas de implantación y cementación óptimas que reduzcan al mínimo dichas partículas durante el desempeño de la articulación.
- Sensibilidad al metal ha sido reportada luego del contacto con implantes ortopédicos. Los elementos más comunes que presentan sensibilidad son el níquel, el cobalto y el cromo presentes en las bioaleaciones de acero inoxidable y aleaciones de cromo-cobalto. El titanio y sus aleaciones es marcadamente menos antígeno y se recomienda su utilización en pacientes alérgicos o con sensibilidad a los metales.

El mayor grado de desgaste puede comenzar con partículas de desgaste que causan la abrasión de las superficies articulares. Un elevado nivel de desgaste puede reducir notablemente la vida útil de los componentes protésicos. Los mecanismos de desgaste generados pueden ser por abrasión, adhesión, fatiga o por inclusión de un tercer cuerpo entre las superficies de rozamiento. El elevado nivel de partículas de desgaste presente en la articulación puede dar inicio a osteólisis asintomática o generando dolor e hinchazón. Este proceso debe ser controlado por el médico cirujano ya que puede llevar a la revisión de los componentes protésicos.

Se han presentado casos de neuropatías periféricas en el seguimiento de pacientes con reemplazos articulares. La lesión subclínica del nervio ha sido reportada y podría ser resultado de un traumatismo quirúrgico.

La incorrecta implantación de los componentes puede dar lugar a la luxación o subluxación de los mismos. La laxitud muscular puede contribuir a estas condiciones.

En caso de traumatismo o pérdida de fijación, los componentes pueden aflojarse o migrar.

Puede presentarse fractura del implante por fatiga como consecuencia de un traumatismo, nivel de actividad no adecuado, alineamiento incorrecto o agotamiento de la vida útil del mismo.

Limitación del rango de movimiento articular como consecuencia de la incorrecta selección o implantación de los componentes, la incorrecta impactación y la formación de calcificaciones periarticulares.

8- INFORMACION PARA EL PACIENTE

El paciente deberá ser informado por el cirujano de los riesgos potenciales y efectos adversos debidos a la inserción del implante y este deberá dar su consentimiento a la intervención quirúrgica propuesta.

El cirujano deberá informar al paciente que reciba el implante que la seguridad y durabilidad del mismo dependen de las funciones del paciente, especialmente la actividad física y el peso.

El paciente deberá informar al cirujano sobre cualquier cambio referente al miembro operado.

El paciente deberá acordar un examen postoperatorio realizado por su cirujano ortopedista en orden a detectar cualquier signo de desgaste o malfunción del implante.

Antes de cualquier tratamiento o examen médico, el paciente deberá informar al profesional que lleva implantado un implante ortopédico especialmente en aquellos en los que se somete a campos electromagnéticos o radiaciones (por ej.: Resonancia magnética Nuclear – RMN).

Esta u otras circunstancias deben asentarse en la historia clínica e informarse al paciente

9- EMBALAJE Y ESTERILIZACION

Cada producto está acondicionado en un envase de protección mecánica y un doble blister, apto para ser esterilizado por radiación gamma o por óxido de etileno.

Tanto los envases utilizados (Packaging) como los Procesos de Esterilización empleados están validados por normas internacionales y cumplen con todos los requerimientos regulatorios, por lo que CORCAST S.A. garantiza la esterilidad de todo implante que figure como ESTERIL en su envase y que no haya sido abierto o dañado.

Si se observara alguna anomalía o deterioro en el envase del implante, contáctese con el área Técnica de CORCAST S.A., para solucionar el inconveniente.

En caso que se requiera la reesterilización de un componente totalmente metálico abierto previamente y que no haya estado en contacto con fluidos o tejidos orgánicos, se recomienda seguir los siguientes parámetros que aseguren un nivel de seguridad de esterilidad SAL 10^{-6} :

Método	Ciclo	Temperatura	Exposición
Vapor	Pre-Vacío	132°C	10 minutos

Eduardo Coronel
Apoderado Legal

Farm. Carlos Javier Otero
Director Técnico – MP: 20.475

Hoja 5 de 6

**CorCast**

Anexo III.B - Disp 2318/02
Proyecto de Instrucciones de Uso
Prótesis para reemplazo total de cadera

ATENCIÓN: Implantes totalmente de polietileno, metálicos con componentes de polietileno o con recubrimientos superficiales del tipo hidroxiapatita (HA) o plasma-spray nunca deben ser reesterilizados. Las temperaturas requeridas para este método pueden deteriorar las características físicas y/o dimensionales del componente. No utilice estos componentes si el embalaje estéril se encuentra dañado.

CORCAST S.A. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA REESTERILIZACION DE SUS IMPLANTES QUE NO HAYA SIDO PREVIAMENTE COMUNICADA Y AUTORIZADA POR NUESTRO PERSONAL TECNICO.

10- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Cada implante lleva grabado en su superficie un número de lote que coincide con el impreso en la etiqueta del envase.

Este número deberá agregarse a la historia clínica del paciente y al certificado de implante valiéndose de la etiqueta autoadhesiva adjunta. La comunicación de este número es condición de esta garantía pues nos permite rastrear la historia de cada implante desde la fabricación, incluida la materia prima, hasta la fecha de terminación y de su esterilización.

11- ALMACENAMIENTO

Los implantes deben mantenerse en su embalaje original, en el lugar habitual destinado al almacenaje de los implantes a bajo condiciones ambientales normales. A tal efecto aconsejamos controlar los vencimientos de modo tal que los primeros implantes en utilizarse hayan sido los primeros en fabricarse.

12- RECOMENDACIONES REFERENTES A LA CIRUGÍA

Los quirófanos deberán ser asépticos para evitar la infección del implante que, en la mayoría de los casos, conlleva a la revisión del mismo generando secuelas en el paciente.

La cirugía deberá ser planeada cuidadosamente conforme al los resultados radiológicos.

La técnica de cementación es fundamental para un correcto anclaje del implante. Deberá evitarse la movilización del implante durante el fraguado. Una mala limpieza del área a cementar incrementa el riesgo de introducción de partículas de cemento entre las superficies de rozamiento provocando el desgaste excesivo del implante; por esto se recomienda una cuidadosa limpieza luego del cementado.

13- NORMAS UTILIZADAS PARA LA FABRICACION DE IMPLANTES

Todos nuestros productos están fabricados sobre la base de las especificaciones dadas por normas en vigencia con los materiales testeados y reconocidos, que responden a normas del Instituto Argentino de Normalización (IRAM) y a sus equivalentes internacionales ISO - *International Organization for Standardization* y ASTM - *American Society for Testing Materials*. CORCAST S.A. pone a disposición del profesional la nómina de normas actualmente vigente para la fabricación de implantes ortopédicos.

14- SERVICIOS AL CONSUMIDOR

Para toda consulta referente a los implantes fabricados por nuestra empresa sírvase comunicarse al (54-11) 4765-1357 o bien por correo electrónico a: info@corcast.com.ar

15- SIMBOLOGIA (ISO 15223-2)

	UNICO USO		LEA LAS INSTRUCCIONES
	LOTE N°		FECHA DE VENCIMIENTO
	REFERENCIA / CODIGO / CATALOGO N°		ESTERILIZADO POR RADIACION
	FECHA DE FABRICACION		

Eduardo Coronel
ApoDERado Legal

Farm. Carlos Javier Otero
Director Técnico – MP: 20.475

Hoja 6 de 6



CorCast

Anexo III.B - Disp 2318/02
Proyecto de rótulos y tarjeta de implante
Prótesis para reemplazo total de cadera

Modelo de rótulo – Implantes estériles

CORCAST	
SISTEMA DE PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA	
Descripción Producto: xxx	
DIAMETRO\DIMENSION: xxx	
REF	CODIGO: xxx
LOT	LOTE: xxx
CANTIDAD: xxx	
MATERIAL: xxx	
	FECHA DE FABRICACION: MM-AAAA
STERILE R	ESTERIL: Radiación Gamma
	VENCIMIENTO: MM-AAAA
<u>Fabricante:</u> CORCAST S.A. M.Lebensohn N°1196 – Bella Vista – Pdo. San Miguel – Provincia de Buenos Aires – República Argentina Teléfono: (011) 4765-1357 E-mail: info@corcast.com.ar	
<u>Director Técnico:</u> Carlos Javier Otero – MP: 20.475 PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 2351-2	
Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias	
	Instrucciones especiales, advertencias y precauciones: Referirse siempre a las instrucciones de utilización.
ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y MANIPULACIÓN: Conservar en ambiente limpio y fresco.	
	Producto de un solo uso – No utilizar si el envase se encuentra dañado o abierto

Eduardo Coronel
Apoderado Legal

Farm. Carlos Javier Otero
Director Técnico – MP: 20.475


Hoja 1 de 6

**CorCast**

Anexo III.B - Disp 2318/02
Proyecto de rótulos y tarjeta de implante
Prótesis para reemplazo total de cadera

CAFAVI	
SISTEMA DE PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA	
Descripción Producto: xxx	
DIAMETRO\DIMENSION: xxx	
REF	CODIGO: xxx
LOT	LOTE: xxx
CANTIDAD: xxx	
MATERIAL: xxx	
	FECHA DE FABRICACION: MM-AAAA
STERILE R	ESTERIL: Radiación Gamma
	VENCIMIENTO: MM-AAAA
Fabricante: CORCAST S.A. M.Lebensohn N°1196 – Bella Vista – Pdo. San Miguel – Provincia de Buenos Aires – República Argentina Teléfono: (011) 4765-1357 E-mail: info@corcast.com.ar	
Director Técnico: Carlos Javier Otero – MP: 20.475 PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 2351-2	
Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias	
	Instrucciones especiales, advertencias y precauciones: Referirse siempre a las instrucciones de utilización.
ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y MANIPULACIÓN: Conservar en ambiente limpio y fresco.	
	Producto de un solo uso – No utilizar si el envase se encuentra dañado o abierto


Eduardo Coronel
Apoderado Legal

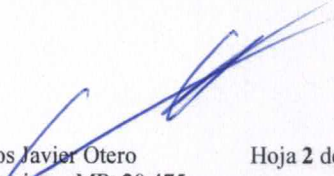
Farm. Carlos Javier Otero
Director Técnico – MP: 20.475

Hoja 2 de 6

**CorCast**

Anexo III.B - Disp 2318/02
Proyecto de rótulos y tarjeta de implante
Prótesis para reemplazo total de cadera

Proyecto de Tarjeta de Implante según Art. 11° de la Disp. 727/13

CORCAST - PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA

NOMBRE PRODUCTO:

MODELO:

Lote N°:

ANMAT PM-2351-2

Fabricado por:

CORCAST S.A.

**M.Lebensohn N°1196 – Bella Vista – Pdo. San Miguel – Provincia de Buenos Aires –
República Argentina - Teléfono: (011) 4765-1357 - E-mail: info@corcast.com.ar**

Director técnico: Carlos Javier Otero – MP: 20.475

CENTRO SANITARIO DE IMPLANTACION:

Fecha de implantación:

PACIENTE (Nombre y apellido):

D.N.I.:

MEDICO (Nombre y apellido):

D.N.I.:

MATRICULA:

EJEMPLAR PARA EL PACIENTE

CORCAST - PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA

NOMBRE PRODUCTO:

MODELO:

Lote N°:

ANMAT PM-2351-2

Fabricado por:

CORCAST S.A.

**M.Lebensohn N°1196 – Bella Vista – Pdo. San Miguel – Provincia de Buenos Aires –
República Argentina - Teléfono: (011) 4765-1357 - E-mail: info@corcast.com.ar**

Director técnico: Carlos Javier Otero – MP: 20.475

CENTRO SANITARIO DE IMPLANTACION:

Fecha de implantación:

PACIENTE (Nombre y apellido):

D.N.I.:


MEDICO (Nombre y apellido):

D.N.I.:

MATRICULA:

EJEMPLAR PARA HISTORIA CLINICA


Eduardo Coronel
Apoderado Legal

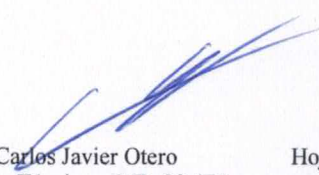
Farm. Carlos Javier Otero
Director Técnico – MP: 20.475

Hoja 3 de 6



Anexo III.B - Disp 2318/02
Proyecto de rótulos y tarjeta de implante
Prótesis para reemplazo total de cadera

CORCAST - PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA

NOMBRE PRODUCTO:

MODELO:

Lote N°:

ANMAT PM-2351-2

Fabricado por:

CORCAST S.A.

M.Lebensohn N°1196 – Bella Vista – Pdo. San Miguel – Provincia de Buenos Aires – República Argentina - Teléfono: (011) 4765-1357 - E-mail: info@corcast.com.ar

Director técnico: Carlos Javier Otero – MP: 20.475

CENTRO SANITARIO DE IMPLANTACION:

Fecha de implantación:

PACIENTE (Nombre y apellido):

D.N.I:

MEDICO (Nombre y apellido):

D.N.I:

MATRICULA:

EJEMPLAR PARA OBRA SOCIAL

CORCAST - PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA

NOMBRE PRODUCTO:

MODELO:

Lote N°:

ANMAT PM-2351-2

Fabricado por:

CORCAST S.A.

M.Lebensohn N°1196 – Bella Vista – Pdo. San Miguel – Provincia de Buenos Aires – República Argentina - Teléfono: (011) 4765-1357 - E-mail: info@corcast.com.ar

Director técnico: Carlos Javier Otero – MP: 20.475

CENTRO SANITARIO DE IMPLANTACION:

Fecha de implantación:

PACIENTE (Nombre y apellido):

D.N.I:

MEDICO (Nombre y apellido):

D.N.I:

MATRICULA:

EJEMPLAR PARA FABRICANTE


Eduardo Coronel
Apoderado Legal


Farm. Carlos Javier Otero
Director Técnico – MP: 20.475

Hoja 4 de 6

Proyecto de Tarjeta de Implante según Art. 11° de la Disp. 727/13

CAFAVI - PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA

NOMBRE PRODUCTO:

MODELO:

Lote N°:

ANMAT PM-2351-2

Fabricado por:

CORCAST S.A.

M.Lebensohn N°1196 – Bella Vista – Pdo. San Miguel – Provincia de Buenos Aires – República Argentina - Teléfono: (011) 4765-1357 - E-mail: info@corcast.com.ar

Director técnico: Carlos Javier Otero – MP: 20.475

CENTRO SANITARIO DE IMPLANTACION:

Fecha de implantación:

PACIENTE (Nombre y apellido):

D.N.I:

MEDICO (Nombre y apellido):

D.N.I:

MATRICULA:

EJEMPLAR PARA EL PACIENTE

CAFAVI - PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA

NOMBRE PRODUCTO:

MODELO:

Lote N°:

ANMAT PM-2351-2

Fabricado por:

CORCAST S.A.

M.Lebensohn N°1196 – Bella Vista – Pdo. San Miguel – Provincia de Buenos Aires – República Argentina - Teléfono: (011) 4765-1357 - E-mail: info@corcast.com.ar

Director técnico: Carlos Javier Otero – MP: 20.475

CENTRO SANITARIO DE IMPLANTACION:

Fecha de implantación:

PACIENTE (Nombre y apellido):

D.N.I:

MEDICO (Nombre y apellido):


D.N.I:

MATRICULA:

EJEMPLAR PARA HISTORIA CLINICA



Eduardo Coronel
Apoderado Legal

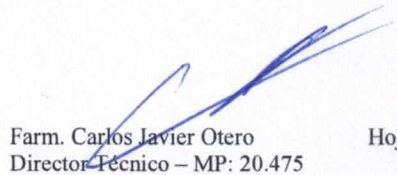

Farm. Carlos Javier Otero
Director Técnico – MP: 20.475

Hoja 5 de 6

CAFAVI - PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA

NOMBRE PRODUCTO:

MODELO:

Lote N°:

ANMAT PM-2351-2

Fabricado por:

CORCAST S.A.

**M.Lebensohn N°1196 – Bella Vista – Pdo. San Miguel – Provincia de Buenos Aires –
República Argentina - Teléfono: (011) 4765-1357 - E-mail: info@corcast.com.ar**

Director técnico: Carlos Javier Otero – MP: 20.475

CENTRO SANITARIO DE IMPLANTACION:

Fecha de implantación:

PACIENTE (Nombre y apellido):

D.N.I:

MEDICO (Nombre y apellido):

D.N.I:

MATRICULA:

EJEMPLAR PARA OBRA SOCIAL

CAFAVI - PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA

NOMBRE PRODUCTO:

MODELO:

Lote N°:

ANMAT PM-2351-2

Fabricado por:

CORCAST S.A.

**M.Lebensohn N°1196 – Bella Vista – Pdo. San Miguel – Provincia de Buenos Aires –
República Argentina - Teléfono: (011) 4765-1357 - E-mail: info@corcast.com.ar**

Director técnico: Carlos Javier Otero – MP: 20.475

CENTRO SANITARIO DE IMPLANTACION:

Fecha de implantación:

PACIENTE (Nombre y apellido):

D.N.I:

MEDICO (Nombre y apellido):


D.N.I:

MATRICULA:

EJEMPLAR PARA FABRICANTE



Eduardo Coronel
Apoderado Legal

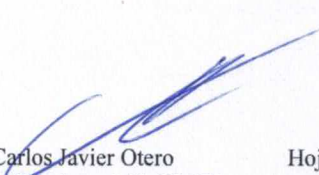

Farm. Carlos Javier Otero
Director Técnico – MP: 20.475

Hoja 6 de 6



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: rot, e, inst, de uso-CORCAST S.A.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.01.23 09:41:52 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.01.23 09:41:53 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-001563-22-1

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº 1-0047-3110-001563-22-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por CORCAST S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 2351-2

Nombre descriptivo: SISTEMA DE PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-150 Prótesis, de Articulación, para Cadera, Totales

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CORCAST, CAFAVI

Modelos:

CODIGO DESCRIPCION

IMPLANTES

T092 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 7.5 mm.
T093 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 10 mm.
T094 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 12.5 mm.
T095 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 15 mm.
T096 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 17.5 mm.
T097 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 20 mm.
T098 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 42
T099 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 44
T100 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 46
T101 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 48
T102 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 50
T103 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 52
T104 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 54
T105 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 56
T106 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 58
T107 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 60
T108 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 44
T109 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 50
T110 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 54
T111 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 42
T112 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 46
T113 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 48
T114 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 52
T115 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 56
T116 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 58
T117 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 60
T118 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.42
T119 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.44
T120 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.46
T121 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.48
T122 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.50
T123 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.52
T124 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.54
T125 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.56
T126 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.58
T127 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL-AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-Diam.ext.60
T128 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 42
T129 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 44
T130 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 46
T131 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 48
T132 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 50
T133 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 52
T134 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 54
T135 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 56
T136 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 58

T137 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello corto
 T138 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello mediano
 T139 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello largo
 T140 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO -6° diam.10/12mm-Std
 T141 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO -6° diam.10/12mm-Std-Desplaz.40mm.
 T142 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Fina-Espesor.8mm
 T143 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Gruesa-Espesor 9.5mm.
 T144 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO -6° diam. 10/12mm - Pequeña -
 T145 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Std aletada-Desp.40mm
 T146 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVIS.-tallo largo
 T147 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.35mm.
 T148 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.40mm.
 T149 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.45mm.
 T150 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-Extra ref.-Desp.40mm.
 T151 PROT.CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.-Desp.40mm.
 T152 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello corto
 T153 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano
 T154 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo
 T155 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XL
 T156 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XXL
 T157 CABEZA MODULAR Diametro 22mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello corto
 T158 CABEZA MODULAR Diametro 22mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano
 T159 CABEZA MODULAR Diametro 22mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo
 T160 CABEZA MODULAR Diametro 22 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XL
 T161 CABEZA MODULAR Diametro 22 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XXL
 T162 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello corto
 T163 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo
 T164 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano
 T165 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XL
 T166 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XXL
 T167 CABEZA MODULAR Diametro 36 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello corto
 T168 CABEZA MODULAR Diametro 36 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo
 T169 CABEZA MODULAR Diametro 36 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano
 T170 CABEZA MODULAR Diametro 36 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XL
 T171 CABEZA MODULAR Diametro 36 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XXL
 T172 COTILO CHARNLEY diam.int.22mm.-PPL-Excentrico-Aletado-d.ext.35mm.
 T173 COTILO CHARNLEY diam.int.22mm. - PPL - Diam. ext. 44 mm.
 T174 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Diam. ext. 44 mm.
 T175 COTILO CHARNLEY diam.int.22mm. - PPL - Diam. ext. 40 mm.
 T176 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Diam. ext. 40 mm.
 T177 COTILO CHARNLEY diam.int.22mm. - PPL - Diam. ext. 50 mm.
 T178 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Diam. ext. 50 mm.
 T179 COTILO CHARNLEY diam.int.22 mm.-PPL-Chico s/borde dentado-d.ext.40mm.
 T180 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-CROSSLINK-Diam.ext.ext. 44 mm.
 T181 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-CROSSLINK-Diam.ext.ext. 40 mm.
 T182 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-CROSSLINK-Diam.ext.ext. 50 mm.

T183 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-Aletado-diam. ext. 50 mm.
T184 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-Aletado-diam. ext. 44 mm.
T185 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-Aletado-diam. ext. 40 mm.
T186 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 50 mm.
T187 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 44 mm.
T188 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 40 mm.
T189 COTILO CHARNLEY diam.int. 32 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 50 mm.
T190 COTILO CHARNLEY diam.int. 32 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 44 mm.
T191 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-CROSSLINK-Alet.-diam.ext.50mm
T192 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-CROSSLINK-Alet.-diam.ext.44mm.
T193 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.-PPL-CROSSLINK-Alet.-diam.ext.40mm.
T194 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm.-PPL-CROSSLINK-Alet.-diam.ext.50mm
T195 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm.-PPL-CROSSLINK-Alet.-diam.ext.44mm.
T196 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm.-PPL-CROSSLINK-Alet.-diam.ext.40mm.
T197 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.- AUTORRET-Aletado-diam.ext.50mm.
T198 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.- AUTORRET-Aletado-diam.ext.44mm.
T199 COTILO CHARNLEY diam.int. 22 mm.- AUTORRET-Aletado-diam.ext.40mm.
T200 TALLO TCCR 12/14 STANDARD TO
T201 TALLO TCCR 12/14 STANDARD T1
T202 TALLO TCCR 12/14 STANDARD T2
T203 TALLO TCCR 12/14 STANDARD T3
T204 TALLO TCCR 12/14 STANDARD T4
T205 TALLO TCCR 12/14 STANDARD T5
T206 TALLO TCCR 12/14 OFF SET TO
T207 TALLO TCCR 12/14 OFF SET T1
T208 TALLO TCCR 12/14 OFF SET T2
T209 TALLO TCCR 12/14 OFF SET T3
T210 TALLO TCCR 12/14 OFF SET T4
T211 TALLO TCCR 12/14 OFF SET T5
T212 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 40 mm
T213 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 43 mm
T214 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 46 mm
T215 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 49 mm
T216 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 52 mm
T217 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 55 mm
T218 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 58 mm
T219 COTILO TCCR Diam. Int. 22mm - Retentivo 61 mm
T220 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 40 mm
T221 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 43 mm
T222 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 46 mm
T223 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 49 mm
T224 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 52 mm
T225 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 55 mm
T226 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 58 mm
T227 COTILO TCCR Diam. Int. 28mm - Retentivo 61 mm
T228 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 40 mm

T229 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 43 mm
T230 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 46 mm
T231 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 49 mm
T232 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 52 mm
T233 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 55 mm
T234 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 58 mm
T235 COTILO TCCR Diam. Int. 32mm - Retentivo 61 mm
T236 CABEZA MODULAR Diametro 22 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +0
T237 CABEZA MODULAR Diametro 22 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +4
T238 CABEZA MODULAR Diametro 22 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +8
T239 CABEZA MODULAR Diametro 22 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +12
T240 CABEZA MODULAR Diametro 26 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +0
T241 CABEZA MODULAR Diametro 26 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +4
T242 CABEZA MODULAR Diametro 26 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +8
T243 CABEZA MODULAR Diametro 26 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +12
T244 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello -3
T245 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +0
T246 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +4
T247 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +8
T248 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +12
T249 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +16
T250 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello -3
T251 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +0
T252 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +4
T253 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +8
T254 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +12
T255 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 12/14mm. - Cuello +16
T256 TCCR CENTRALIZADOR DISTAL
T257 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 39 mm.
T258 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 41 mm.
T259 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 43 mm.
T260 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 45 mm.
T261 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 47 mm.
T261 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 49 mm.
T263 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 51 mm.
T264 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 53 mm.
T265 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 55 mm.

INSTRUMENTAL

0001 Charnley Monoblock Instrumental complementario Pinza para capitones -
0002 Charnley Monoblock Instrumental complementario Cureta de anillo -
0003 Charnley Monoblock Instrumental complementario Cureta raspa -
0004 Charnley Monoblock Instrumental complementario Cureta chica -
0005 Charnley Monoblock Instrumental complementario Cureta mediana -
0006 Charnley Monoblock Instrumental complementario Cureta grande -
0007 Charnley Monoblock Instrumental complementario Elevador Hohmann a 45°
0008 Charnley Monoblock Instrumental complementario Separador de Hohmann -

0009 Charnley Monoblock Instrumental complementario Separador Morris -
0010 Charnley Monoblock Instrumental complementario Separador Ollier -
0011 Charnley Monoblock Instrumental complementario - CAJA ACERO INOX
0012 Charnley Monoblock Instrumental complementario - BASTIDORES
0013 Charnley Monoblock Instrumental complementario - CAJA ACERO INOX MODULAR -
0014 Charnley Monoblock Instrumental complementario - BASTIDORES MODULAR -
0015 Charnley Monoblock Vastago femoral Repuesto cabeza de impactor (teflon)
0016 Charnley Monoblock Vastago femoral Davier Trocanter -
0017 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Pasa sierra (juego de 2)
0018 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Separador de de cuadro
0019 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm palanca Waston Jones
0020 Charnley Monoblock Vastago femoral Elevador femoral Charnley -
0021 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Separad.autoest.horiz.
0022 Charnley Monoblock Vastago femoral Separador autoestático vertical -
0023 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Mangos p/sierra de Gigli
0024 Charnley Monoblock Vastago femoral Berbiqui para fresas trocanter
0025 Charnley Monoblock Vastago femoral Fresa cónica para canal medular
0026 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Fresa cónica mango en "T"
0027 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Raspa Recta
0028 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Raspa Curva -
0029 Charnley Monoblock Vastago femoral Implantador de Protesis Femoral -
0030 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Impac.cabeza de teflon
0031 Charnley Monoblock Vastago femoral Pinza autoestatica para alambre -
0032 Charnley Monoblock Vastago femoral Mechas diametro 3.5mm (2) -
0033 Charnley Monoblock Vastago femoral Pasa alambre -
0034 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Estribo Kirschner
0035 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 90-40 -
0036 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 70-E -
0037 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 68-ME -
0038 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 91-40 -
0039 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 71-H1 -
0040 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 72-H2 -
0041 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 92-40 -
0042 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 73-H3 -
0043 Charnley Monoblock Vastago femoral Protesis de prueba 74-H4 -
0044 Charnley Monoblock Instrumental complementario-IMPACTOR COLA DE PESCADO
0045 Charnley Monoblock Instrumental complementario-PROTESIS DE PRUEBA 93-40.
0046 Charnley Monoblock Instrumental complementario-IMPACTOR CON PUNTA PLANA
0047 Charnley Monoblock Instrumental complementario-RETRACTOR HORIZONTAL C/TORN.
0048 Charnley Monoblock Instrumental complementario-TALADRO P/MECHAS Y FRESAS
0049 Charnley Monoblock Vastago femoral - Raspa bayoneta izquierda - CURVA
0050 Charnley Monoblock Vastago femoral - Raspa bayoneta derecha - CURVA
0051 Charnley Monoblock Vastago femoral - Raspa bayoneta izquierda - RECTA
0052 Charnley Monoblock Vastago femoral - Raspa bayoneta derecha - RECTA
0053 Charnley Monoblock Componente acetabular Mecha para centrado y anclaje
0054 Charnley Monoblock Componente acetabular Mango "T" manual p/fresa canastilla

0055 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø38 a 58mm
0056 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 40mm -
0057 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 42mm -
0058 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 44mm -
0059 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 46mm -
0060 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 48 mm. -
0061 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 50 mm. -
0062 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 52 mm. -
0063 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 54 mm. -
0064 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 56 mm. -
0065 Charnley Monoblock Comp.acetab.Fresa acetab. de acople rapido Ø 58 mm. -
0066 Charnley Monoblock Componente acetabular Acople de fresa para taladro -
0067 Charnley Monoblock Componente acetabular Acople de fresa para motor -
0068 Charnley Monoblock Componente acetabular Mango para cartabon -
0069 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab.40mm.
0070 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab.44mm.
0071 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab.50mm.
0072 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab.54mm.
0073 Charnley Monoblock Vastago femoral cuello 6° 10/12mm Clavijas -
0074 Charnley Monoblock Vast.femoral cuello 6°10/12mm Extractor-Impactor de clavijas
0075 Charnley Monoblock Componente acetabular Mechas de 6 mm. con tope -
0076 Charnley Monoblock Componente acetabular Guia p/cotilo c/expulsor 22mm
0077 Charnley Monoblock Componente acetabular Empujador de copa -
0078 Charnley Monoblock Componente acetabular Empujador de copa modificado -
0079 Charnley Monoblock Componente acetabular Guia p/cotilo c/expulsor 28mm
0080 Charnley Monoblock VALVAS PARA OBESOS
0081 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab. 42mm
0082 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab. 46mm
0083 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab. 48mm
0084 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab. 52mm
0085 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab. 56mm
0086 Charnley Monoblock Comp.acetab.Cartabon p/acetab. 58mm
0087 Charnley Monoblock Vastago femoral - Raspa recta fina (75R)
0088 Charnley Conico Instrumental complementario Gancho Lambotte -
0089 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Extractor para cabeza intercambiable -
0090 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Porta protesis para C.CONICO -
0091 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 90-40-Z26
0092 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 70-E-Z26
0093 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 68-ME-Z26
0094 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 91-40-Z26
0095 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 71-H1-Z26
0096 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 72-H2-Z26
0097 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 92-40-Z26
0098 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 73-H3-Z26
0099 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Protesis p/prueba 74-H4-Z26
0100 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Cabeza prueba Ø 22.22mm.-c.corto

0101 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Cabeza prueba Ø 22.22mm.-c.med.
0102 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Cabeza prueba Ø 26mm.-c.corto
0103 Charnley Conico Vast.femoral cuello 6°10/12mm Cabeza prueba Ø 26mm.-c.med.
0104 Copa Bipolar Componente acetabular Mango porta probador -
0105 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.39mm. -
0106 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.41mm. -
0107 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.43mm. -
0108 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.45mm. -
0109 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.47mm. -
0110 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.49mm. -
0111 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.51mm. -
0112 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.53mm. -
0113 Copa Bipolar Componente acetabular Probador diam.55mm. -
0114 BASTIDOR BIPOLAR -
0115 CAJA ACERO INOX BIPOLAR -
0116 Descementacion Vastago femoral- GUBIA V POSITIVA
0117 Descementacion Vastago femoral- GUBIA V NEGATIVA ANGOSTA
0118 Descementacion Vastago femoral Escoplo recto -
0119 Descementacion Vastago femoral- GUBIA RECTA
0120 Descementacion Vastago femoral- GUBIA CURVA MEDIA
0121 Descementacion Vastago femoral Tirabuzon -
0122 Descementacion Vastago femoral Gancho -
0123 Descementacion Vastago femoral Mecha diametro 8mm. -
0124 BASTIDOR DESCEMENTACION -
0125 CAJA ACERO INOX DESCEMENTACION -
0126 Descementacion Vastago femoral- GUBIA CURVA ALTA
0127 Descementacion Vastago femoral- GUBIA INCLINADA CON CUERPO CURVO
0128 Descementacion Vastago femoral- GUBIA V NEGATIVA ANCHA
0129 Descementacion Vastago femoral- MACHO ROSCADOS Ø8MM
0130 Descementacion Vastago femoral- MACHO ROSCADOS Ø10MM
0131 Descementacion Vastago femoral- MACHO ROSCADOS Ø12MM
0132 Descementacion Vastago femoral- MACHO ROSCADOS Ø12MM CONICO
0133 Descementacion Vastago femoral- ESCOPLO "T"
0134 Descementacion Vastago femoral- ESCOPLO BANDERA
0135 Descementacion Vastago femoral- ESCOPLO "X" CURVO CABEZA CORTA
0136 Descementacion Vastago femoral- COMPACTADOR DE HUESO
0137 Descementacion Vastago femoral- CUCHARA ACETABULAR
0138 Descementacion Vastago femoral- CURETA INVERTIDA ANCHA
0139 Descementacion Vastago femoral- CURETA INVERTIDA MEDIA
0140 Descementacion Vastago femoral- CURETA INVERTIDA CHICA
0141 Descementacion Vastago femoral- ESCOPLO "T" CURVO CABEZA CORTA
0142 Descementacion Vastago femoral- ESCOPLO "T" CURVO CABEZA LARGA
0143 Descementacion Vastago femoral- MARTILLO EXTRACTOR
0144 Descementacion - JUEGO DE VALVAS SIMPLES
0145 Descementacion - ESCOPLO RECTO LARGO 40 CM, PUNTA PLANA Y PUNTA CONCAVA
0146 Descementacion - CORTA ALAMBRE

0147 Descementacion - MECHA LARGA 40 CM, DIAM. 6 MM
0148 Descementacion - MECHA LARGA 40 CM, DIAM. 10 MM
0149 Descementacion - FRESAS DE BOLITA 4 MM DE DIAMETRO, LARGO 40 CM
0150 Descementacion - FRESAS DE BOLITA 6 MM DE DIAMETRO, LARGO 40 CM
0151 Descementacion - FRESAS DE BOLITA 8 MM DE DIAMETRO, LARGO 40 CM
0152 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 28 mm Long cuello -3 mm
0153 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 28 mm Long cuello 0 mm
0154 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 28 mm Long cuello +4 mm
0155 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 28 mm Long cuello +8 mm
0156 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 28 mm Long cuello +12 mm
0157 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 28 mm Long cuello +16 mm
0158 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 32 mm Long cuello -3 mm
0159 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 32 mm Long cuello 0 mm
0160 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 32 mm Long cuello +4 mm
0161 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 32 mm Long cuello +8 mm
0162 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 32 mm Long cuello +12 mm
0163 TCCR Cabezal femoral cónico de prueba 32 mm Long cuello +16 mm
0164 TCCR Cuello de prueba TALLO 0 C/ CUELLO STANDARD
0165 TCCR Cuello de prueba TALLO 1 y 2 C/ CUELLO STANDARD
0166 TCCR Cuello de prueba TALLO 3,4 y 5 C/ CUELLO STANDARD
0167 TCCR Cuello de prueba TALLO 0 C/ CUELLO DESPLAZADO
0168 TCCR Cuello de prueba TALLO 1 y 2 C/ CUELLO DESPLAZADO
0169 TCCR Cuello de prueba TALLO 3,4 y 5 C/ CUELLO DESPLAZADO
0170 TCCR Guía de osteotomía 0-5
0171 TCCR Mango de brocha
0172 TCCR Caja de Cíncel
0173 TCCR Mango de anteversión
0174 TCCR Fresa trocanter
0175 TCCR Impactador de cabeza femoral
0176 TCCR Fresa Medular
0177 TCCR Sonda Femoral 8-9 mm
0178 TCCR Sonda Femoral 10-11 mm
0179 TCCR Sonda Femoral 12-13 mm
0180 TCCR Sonda Femoral 14-15 mm
0181 TCCR Sonda Femoral 16-17 mm
0182 TCCR Sonda Femoral 18-19 mm
0183 TCCR Brochas de prueba Iniciador
0184 TCCR Brochas de prueba Talle 0
0185 TCCR Brochas de prueba Talle 1
0186 TCCR Brochas de prueba Talle 2
0187 TCCR Brochas de prueba Talle 3
0188 TCCR Brochas de prueba Talle 4
0189 TCCR Brochas de prueba Talle 5
0190 TCCR Mango de inserción
0191 TCCR Destornillador de tallo femoral
0192 TCCR Escareador Calcar chico

0193 TCCR Escareador Calcar largo
0194 TCCR Bandeja de instrumentos primaria
0195 TCCR Estuche de transporte exterior pequeño
0196 TCCR Tapa para estuche de transporte exterior
0197 TCCR Bandeja de sonido femoral
0198 TCCR Herramienta de apertura de ventilación
0199 TCCR Restrictor de cemento 18.5 mm
0200 TCCR Restrictor de cemento 25 mm
0201 TCCR Restrictor de cemento 30 mm
0202 TCCR Restrictor de cemento 35 mm
0203 TCCR Kit de escultura de cemento conciso
0204 TCCR Absorbedor de succión del canal femoral 19 mm
0205 TCCR Absorbedor de succión del canal femoral 25 mm
0206 TCCR Presurizadores femorales chico
0207 TCCR Presurizadores femorales mediano
0208 TCCR Presurizadores femorales grande
0209 TCCR Insertor del restrictor de cemento femoral
0210 TCCR Cepillo del canal femoral 19 mm
0211 TCCR Cepillo del canal femoral 12.5 mm
0212 TCCR Sistema con jeringa de mezcla al vacío
0213 TCCR Compresor de cemento femoral
0214 TCCR Tapa del Compresor de cemento femoral
0215 Muller Conico Instrum.complement. Hohmann 43mm. pico estrecho
0216 Muller Conico Instrum.complement. Hohmann 24mm.pico largo redondeado
0217 Muller Conico Instrum.complement. Hohmann 18mm.pico estrecho
0218 Muller Conico Instrum.complement. Separador Ollier para pie
0219 Muller Conico Instrum.complement. Gancho puntiagudo para hueso -
0220 Muller Conico Instrum.complement. Pesa 1250 gramos -
0221 Muller Conico Instrum.complement. Gancho para pesa -
0222 Muller Conico Instrum.complement. Brazo telescopico para pesa -
0223 Muller Conico Instrum.complement. Hohmann(angosto)22 mm. p/tejido blando
0224 Muller Conico Instrum.complement. Hohmann(ancho)43mm.p/tejido blando
0225 Muller Conico Instrum.complement. Separador Langenbeck -
0226 Muller Conico Instrum.complement. Escoplo recto -
0227 Muller Conico Instrum.complement. Escoplo curvo -
0228 Muller Conico Instrum.complement. Cureta chica de 9 mm. -
0229 Muller Conico Instrum.complement. Cureta mediana de 13 mm. -
0230 Muller Conico Instrum.complement. Cureta grande de 27 mm. -
0231 CAJA ACERO INOX MULLER MODULAR -
0232 BASTIDORES MULLER MODULAR -
0233 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Separador horquilla Muller femoral
0234 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Extractor de cabeza de femur -
0235 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Palanca p/luxar cabeza femoral
0236 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Raspa p/canal medular(autobloqueante)
0237 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Punzon impactor p/autobloqueante
0238 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Impactor cabeza de teflon -

0239 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Gubia cuello de cisne -
 0240 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Gubia curva de diametro 9 mm
 0241 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Gubia doble curva de diam.9 mm
 0242 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Protesis prueba Muller 7,5 mm
 0243 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Protesis prueba Muller 10 mm
 0244 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Protesis prueba Muller 12,5 mm
 0245 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Protesis prueba Muller 15 mm
 0246 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Protesis prueba Muller 17,5 mm
 0247 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Protesis prueba Muller 20 mm
 0248 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Cabeza prueba Ø 28 mm.-c. corto
 0249 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Cabeza prueba Ø 28 mm.-c. med.
 0250 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Cabeza prueba Ø 28 mm.-c. largo
 0251 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Cabeza prueba Ø 32 mm.-c. corto
 0252 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Cabeza prueba Ø 32 mm.-c. med.
 0253 Muller Conico Vast.fem.cuello 6° 10/12mm Cabeza prueba Ø 32 mm.-c. largo
 0254 Muller Conico Vastago femoral - RASPA AUTOBLOQUEANTE 10 MM -
 0255 Muller Conico Vastago femoral - RASPA AUTOBLOQUEANTE 12.5MM -
 0256 Muller Conico Vastago femoral - RASPA AUTOBLOQUEANTE 15 MM -
 0257 Muller Conico Vastago femoral - RASPA AUTOBLOQUEANTE 17.5MM -
 0258 Muller Conico Vastago femoral - RASPA AUTOBLOQUEANTE 20 MM -
 0259 Muller Conico Componente acetabular Guia implantadora de cotilo -
 0260 Muller Conico Componente acetabular Cartabon p/impactar cotilo de 28 mm
 0261 Muller Conico Componente acetabular Cartabon p/impactar cotilo de 32 mm
 0262 Muller Conico Vastago femoral - CABEZA PRUEBA DIAM. 28MM. CUELLO XL
 0263 Muller Conico Vastago femoral - CABEZA PRUEBA DIAM. 28MM. CUELLO XXL
 0264 Muller Conico Componente acetabular Templates p/planeamiento quirúrgico
 0265 Muller Conico Componente acetabular - Impactador cotilo doble cabeza 28-32mm.
 0266 Muller Guia implantadora para cotilo con expulsor para diam.32mm PPL
 0267 Anillo Muller Componente acetabular Acople flexible para machos -
 0268 Anillo Muller Componente acetabular Acople flexible para mechas -
 0269 Anillo Muller Componente acetabular Destornillador cardanico -
 0270 Anillo Muller Componente acetabular Guia de mechas -
 0271 Anillo Muller Componente acetabular Macho diametro 6,5 x 45 mm. -
 0272 Anillo Muller Componente acetabular Mecha de diametro 3.2 mm. x 56 mm.
 0273 Anillo Muller Componente acetabular Medidor de profundidad -
 0274 Anillo Muller Componente acetabular Macho diametro 4,5 x 45 mm. -
 0275 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 44mm.-D.ext.51mm
 0276 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 46mm.-D.ext.53mm
 0277 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 48mm.-D.ext.55mm
 0278 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 50mm.-D.ext.57mm
 0279 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 52mm.-D.ext.59mm
 0280 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 54mm.-D.ext.61mm
 0281 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 56mm.-D.ext.63mm
 0282 Anillo Muller Componente acetabular Cartabon p/cotilo diam 58mm.-D.ext.65mm

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Artritis reumatoide

Espondilitis anquilosante

Enfermedad articular degenerativa (osteoartritis, enfermedad de Paget, fracturas y luxaciones traumáticas)

Necrosis vascular

Procesos de no consolidación de fracturas de cadera con afección de la cabeza femoral

Tumores óseos

Fracasos de cirugía reconstructiva

Fusión de cadera y pseudo artrosis

Subluxación congénita

Período de vida útil: 3 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Componente Cotilo (1 unidad), cabeza (1 unidad) y Tallo (1 unidad) envasados por separado.

Método de esterilización: por radiación

Nombre del fabricante:

CORCAST S.A.

Lugar de elaboración:

M.Lebensohn N°1196 – Bella Vista – Pdo. San Miguel – Provincia de Buenos

Aires – República Argentina

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 2351-2 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-001563-22-1

N° Identificadorio Trámite: 37730

