



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.I.

DISPOSICIÓN N° **2252**

BUENOS AIRES, **17 ABR 2013**

VISTO el Expediente N° 1-47-18051-12-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones ACRYL-AR S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 2252

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca AMERICAN ORTHODONTICS, nombre descriptivo ADITAMENTOS PARA ORTODONCIA y nombre técnico MATERIALES PARA ORTODONCIA, de acuerdo a lo solicitado por ACRYL-AR S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.


0. ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 123 a 142 y 143 a 146 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-1042-67, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscribábase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° **2252**

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-18051-12-5

DISPOSICIÓN N°

2252

DR. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°**2.252**.....

Nombre descriptivo: ADITAMENTOS PARA ORTODONCIA.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-697- MATERIALES PARA ORTODONCIA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): AMERICAN ORTHODONTICS.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Prevenir o corregir las maloclusiones dentarias y deformidad dentofacial.

Modelo/s: Abrazaderas [Brackets]

Abrazaderas autoligables

Vision LP - Sistema Damon*

Vision LP - Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*

T3 - Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*

T3 - Sistema Roth*

T3 - Sistema Andrews*

Empower - Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*

Empower - Sistema Roth*

Empower - opciones de baja torsión

Empower - Sistema Damon* modificado - Maxilar

Empower - Sistema Damon* modificado - Mandibular

Empower - Sistema Roncone* modificado

Empower - sistema de ranura vertical Glanelly

Empower - Maxilar 1er. molar - Cementado directo

Empower - Maxilar 1er. molar - Soldable

Empower - Mandibular 1er. molar - Cementado directo


Empower - Mandibular 1er. molar - Soldable

Empower - Typodents



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.A.T.

Empower – Tarjeta para carpeta de detalles
Abrazaderas [Brackets] metálicas
Bajo perfil – Sistema Roth de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema Alexander* de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema de arco recto modificado de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema Roth de ranura en V de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema de ranura vertical bidimensional Glanelly de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema Bioprogresivo de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema Bioprogresivo modificado de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi* de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema de ranura en V Butterfly de bajo perfil
Bajo perfil – opciones de sistema de bajo perfil
Series Mini Master - Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
Series Mini Master – Sistema Roth
Series Mini Master – Sistema de arco recto
Serie Mini Master - Sistema de arco recto modificado
Series Mini Master – Sistema Alexander*
Series Mini Master – Sistema Alexander* de estabilidad a largo plazo
Series Mini Master – Sistema de ranura vertical McLaughlin, Bennett, Trevisi*
Series Mini Master – Sistema de ranura vertical Glanelly Bio-dimensional
Series Mini Master – Sistema de ranura vertical
Series Mini Master – Sistema Bioprogresivo
Series Mini Master – Sistema Bioprogresivo modificado
Series Mini Master – The SEBA System/prescripción Asiática
Series Mini Master – el sistema ProTorque prescripción /latino/hispano
Series Mini Master – opciones de las series – Maxilar
Series Mini Master – opciones de las series – Mandibular
Series Master – Sistema Roth*
Series Master – Sistema de arco recto
Series Master – Sistema Bioprogresivo
Series Master – Sistema Alexander*





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

- Series Master – Sistema IBD (distancia inter-abrazadera) Sondhl*
- Series Master - Sistema IBD (distancia inter-abrazadera)
- Series Master – Sistema de microadhesión
- Series Master – opciones de las series – Maxilar/mandibular
- Mini Standard Edgewise
- Mini Tweed
- Abrazaderas cosméticas
- Radiance – Sistema Roth*
- Radiance – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
- Radiance – Sistema Alexander LTS
- Radiance – Ranura en V
- Virage – Sistema Roth*
- Virage – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
- Virage – Sistema Bio-progresivo
- Virage – el sistema SEBA – evidencia Sugiyama – basado en la prescripción asiática
- 20/40 – Sistema Roth*
- 20/40 – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
- 20/40 – Sistema Standard Edgewise
- Sierra – Sistema Roth*
- Sierra classic – Sistema Roth*
- Silkon Plus - Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
- Silkon Plus – Sistema de arco recto
- Forever Gold – Sistema Roth* de bajo perfil
- Forever Gold – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi* de bajo perfil
- Series Mini Master Forever Gold - Sistema Roth*
- Series Mini Master Forever Gold – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
- Series Mini Master Forever Gold – Sistema Alexander*
- Series Mini Master Forever Gold enchapado en oro 24k – Sistema Roth*
- Series Mini Master Forever Gold – sistema de ranura vertical
- Series Mini Master Forever Gold – tubos molares no convertibles

8



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.

Series Mini Master Forever Gold – tubos molares convertibles

Stealth – Sistema lingual

Stealth Mordida plana

Abrazaderas cosméticas clásicas

Abrazaderas Empower C

Empower C – Empower Typodonts

Tubos de cementado directo

Empower SL 1ro. maxilar – autoligado

Empower SL 1ro. mandibular – autoligado

Tubo delgado 1er. o 2do. maxilar – no convertible

Tubo delgado 1er. o 2do. mandibular – no convertible

1er. molar maxilar – no convertible

1er. molar maxilar – convertible

1er. molar mandibular – no convertible

1er. molar mandibular – convertible

2do. molar maxilar – no convertible

2do. molar mandibular – no convertible

2do. molar maxilar – no convertible 2 mm

2do. molar mandibular – no convertible 2 mm

Tubos premolares para cementado directo, maxilar/mandibular

Forever Gold – tubos bucales

Empower – tubos molares

Bandas y fijadores

MR3 – 1er. molar – superior

MR3 – 1er. molar – inferior

Maximun Retention™ – Master Series – MR1 bandas 1er. molar – superior

Maximun Retention™ – Master Series – MR1 bandas 1er. molar – inferior

Maximun Retention™ – Master Series – MRI-32 bandas 1er. molar – superior

Maximun Retention™ – Master Series – MRI-32 bandas 1er. molar – inferior

Maximun Retention™ – Master Series – MR1 bandas 2do. molar – superior

Maximun Retention™ – Master Series – MR1 bandas 2do. molar – inferior



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.A.T.

Maximun Retention™ – Mini Master Series – MR2 1er. molar – superior
Maximun Retention™ – Mini Master Series – MR2 1er. molar – inferior
Maximun Retention™ – Mini Master Series – MR2 2do. molar – superior
Maximun Retention™ – Mini Master Series – MR2 2do. molar – inferior
Maximun Retention™ – Bandas para premolar superior – MR 1er. y 2do.
Maximun Retention™ – Bandas para premolar inferior – MR 1er. premolar.
Maximun Retention™ – Bandas para premolar inferior – MR 2do. premolar.
Moldeados – Master Series – 1er. molar – templado normal – superior
Moldeados – Master Series – 1er. molar – templado normal – inferior
Moldeados – Master Series – 1er. molar serie de línea dura – superior
Moldeados – Master Series – 1er. molar serie de línea dura – inferior
Moldeados – Master Series – 2do. molar – superior
Moldeados – Master Series – 2do. molar – inferior
Moldeados – Mini master Series – 1er. molar – superior
Moldeados – Mini master Series – 1er. molar – inferior
Moldeados – Mini master Series – 2do. molar – superior
Moldeados – Mini master Series – 2do. molar – inferior
Moldeados – Micro Bands – 1er. molar – superior
Moldeados – Micro Bands – 1er. molar – inferior
Moldeados – Premolar – 1ra. y 2da. premolar – superior
Moldeados – Premolar – 1ra. y 2da. premolar – inferior
Anteriores – canino – superior
Anteriores – bandas caninos – inferior
Anteriores – bandas centrales – superior
Anteriores – bandas centrales – inferior
Anteriores – bandas laterales – superior
Anteriores – bandas laterales – inferior
Anteriores – bandas anteriores inferiores
Bandas Rollo – Lisas – superior derecho
Bandas Rollo – Lisas – superior izquierdo
Bandas Rollo – Lisas – inferior derecho



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.I.

Bandas Rollo – Lisas – inferior izquierdo

Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – tuerca universal

Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – gancho + tuerca universal

Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – tuerca cilíndrica

Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – tuerca cilíndrica + 3,2 mm

Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – barra Cantilever

Material y almacenamiento de la banda – banda en bruto

Material y almacenamiento de la banda – tira

Material y almacenamiento de la banda – enrollado

Material y almacenamiento de la banda – cementado directo o Kit Box para almacenamiento de la banda

Material y almacenamiento de la banda – Kit Box para almacenamiento apilable

Material y almacenamiento de la banda – caja para almacenamiento de la banda

Posicionamiento estándar del aditamento lingual – revestimiento

Posicionamiento estándar del aditamento lingual – ojales

Posicionamiento estándar del aditamento lingual – gancho bola

Posicionamiento estándar del aditamento lingual – botones

Posicionamiento estándar del aditamento lingual – abrazadera

§ Posicionamiento estándar del aditamento lingual – torres elásticas

Posicionamiento estándar del aditamento lingual – torres para asentamiento

Aditamentos linguales

Aparatos – Kit de retenedores adhesivos – central – central

Instrumentos – Kit de retenedores adhesivos – central – central

Instrumentos – Kit de retenedores adhesivos – lateral – lateral

Instrumentos – Kit de retenedores adhesivos – cúspide – cúspide

Instrumentos – planos de mordida – plano de mordida corto

Instrumentos – planos de mordidas – plano de mordida largo

Instrumentos – corrector lingual

Instrumentos – cierre de diastema - resorte



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.I.

Instrumentos - cierre de diastema - tubo cementado directo sobre almohadilla

Instrumentos - cierre de diastema - juego de diastemas

Tubos y revestimientos - con muesca de enganche

Tubos y revestimientos - ranurado sin muesca de enganche

Tubos y revestimientos - ranurado con muesca de enganche

Tubos y revestimientos - ranurado con muesca de enganche y barra mesial-distal

Tubos y revestimiento - ranurado con rotación y gancho bola distal

Aditamentos - ojalillos - con forma de tira soldable

Aditamentos - ojalillos - adhesivos

Aditamentos - ojalillos - ojal en espiral adhesivo

Aditamentos - abrazadera de bajo perfil - soldable

Aditamentos - abrazadera de bajo perfil - adhesiva

Aditamentos - botones - soldables

Aditamentos - botones adhesivos

Aditamentos - tacos de base

Aditamentos - cuñas en ala de gaviota- soldable

Aditamentos - cuñas en ala de gaviota - adhesiva

Aditamentos - torres elásticas - soldable

Aditamentos - torres elásticas - adhesiva

Aditamentos - gancho auxiliar

Aditamentos - gancho bola

Maxilar 1er. molar - triple convertible - 3,5 mm Mini Master

Maxilar 1er. molar - triple convertible - 4,2 mm Master

Maxilar 1er. molar - triple convertible - 4,2 mm Cast

Maxilar 1er. molar - triple convertible - Tubos Dr. Korn

Maxilar 1er. molar - doble convertible - 3,5 mm Mini Master

Maxilar 1er. molar - doble convertible - 4,2 mm Master

Maxilar 1er. molar - doble convertible - 4,2 mm Cast

Maxilar 1er. molar - triple convertible - 3,5 mm Mini Master



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.I.

Maxilar 1er. molar - triple convertible - 4,2 mm Master
Maxilar 1er. molar - triple convertible - 4,2 mm Cast
Maxilar 1er. molar - triple convertible - 3,5 mm Mini Master
Maxilar 1er. molar - triple convertible - 4,2 mm Master
Maxilar 1er. molar - triple convertible - 4,2 mm Cast
Maxilar 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Empower SL
Maxilar 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Vision LP SL
Maxilar 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Bajo perfil
Maxilar 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Mini Master
Maxilar 1er. molar - simple convertible - 4,2 mm Cast
Mandibular 1er. molar - doble convertible - 3,5 mm Mini Master
Mandibular 1er. molar - doble convertible - 4,2 mm Master
Mandibular 1er. molar - doble convertible - 4,2 mm Cast
Mandibular 1er. molar - triple convertible - Lip Jumper tube - 3,5 mm Mini Master
Mandibular 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Empower SL
Mandibular 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Vision LP SL
Mandibular 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Mini Master
Mandibular 1er. molar - simple convertible - 4,2 mm Master
Mandibular 1er. molar - simple convertible - 4,2 mm Cast
Maxilar 1er. molar - triple no convertible - 4,2 mm Cast
Maxilar 1er. molar - doble no convertible - 4,5 mm bajo perfil
Maxilar 1er. molar - doble no convertible - 4,2 mm Cast
Maxilar 1er. molar - simple no convertible - 4,5 Bajo perfil.
Maxilar 1er. molar - simple no convertible - 4,2 mm Cast
Mandibular 1er. molar- triple no convertible - Lip Jumper tube - 4,2 mm Cast
Mandibular 1er. molar - doble no convertible - 4,5 mm bajo perfil
Mandibular 1er. molar - doble no convertible - 4,2 mm Cast
Mandibular 1er. molar - doble no convertible - Lip Jumper tube - 4,2 mm Cast
Mandibular 1er. molar - simple no convertible - 4,5 mm Bajo perfil



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Mandibular 1er. molar – simple no convertible – 4,2 mm Cast
Maxilar 2do. molar – simple no convertible – 3,2 mm bajo perfil
Maxilar 2do. molar – simple no convertible – 3,2 mm Cast
Mandibular 2do. molar – simple no convertible – 3,2 mm bajo perfil
Mandibular 2do. molar – simple no convertible – 3,2 mm Cast
Tubos Inconel soldables – tubos redondos y rectangulares
Tubos Inconel soldables – tubos combinados
Tubos Inconel soldables – tubos de combinación doble rectangular
Tubos Inconel maxilares
Tubos Inconel mandibulares
Hickam Maxilar/Tubos Inconel mandibular
Tubos para arcos blandos– simple bajo perfil
Tubos para arcos blandos– 0° redondo de rotación simple
Tubos para arcos blandos– 6° rotación soldable 0.036 redondo y rectangular
Tubos para arcos blandos– 0° rotación soldable 0.036 combinación redondo
Tubos para arcos blandos– 0° rotación soldable doble combinación
Fundas linguales – Funda con muesca para enganche
Fundas linguales – Funda acanalada sin muesca para enganche
Fundas linguales – Funda acanalada con muesca para enganche y barra mesiodistal
Fundas linguales – Funda acanalada con rotación y gancho con esfera distal
Alambre.
Arco de alambre TriTanium – Forma I
Arco de alambre TriTanium – Forma III
Alambre "EverWhite", con memoria, de titanio – Forma I
Alambre "EverWhite", con memoria, de titanio – Forma III.
Therma-TI™ Lite – Forma I
Therma-TI™ Lite – Forma II.
Therma-TI™ - Forma I.
Therma-TI™ - Forma III.
Therma-TI™ "D" – Forma I.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.M.S.I.

Therma-TI™ "D" - Forma III.

Therma-TI™ "D" - VLP sin doblez en la línea media.

Therma-TI™ "D" - VLP con doblez en la línea media.

Therma-TI™ "D" - VLP topes precargados.

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Forma I.

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Forma I, con doblez en la línea media.

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Forma I, revestido en oro.

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Forma II.

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Forma III.

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Forma III, con doblez en la línea media

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Bonwill Hawley.

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Curva en reversa

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Curva en reversa, tramo recto

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - VLP sin con doblez en la línea media

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - VLP con doblez en la línea media.

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - VLP topes precargados

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Arco retorcido - Forma 1 - 34 mm

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Arco retorcido - Forma 1 - 38 mm

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Arco retorcido - Forma 1 - 28 mm

Superelastic Options - Longitud recta.

Superelastic Options - Bobinas.

Force Two - Alambre con memoria de titanio - Forma I

Alambre Beta Titanium - Forma I.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.I.

Alambre Beta Titanium – Forma III

Alambre Beta Titanium – VLP Universal.

Alambre de acero inoxidable – Forma I.

Alambre de acero inoxidable – Forma I revestido en oro.

Alambre de acero inoxidable – Forma II

Alambre de acero inoxidable – Forma III.

Alambre de acero inoxidable – Bonwill-Hawley

Alambre de acero inoxidable – Bonwill-Hawley Gold Tone.

Alambre de acero inoxidable – VLP de acero inoxidable con espigo

Alambre de acero inoxidable – VLP de acero inoxidable sin epigo, sin doblez en la línea media.

Alambre de acero inoxidable – Forma ahusada.

Alambre de acero inoxidable – Tono oro.

Opciones de Alambre de acero inoxidable – Arcos ahusados, Forma I.

Opciones de Alambre de acero inoxidable – Recto, longitud 14", redondo – Estándar

Opciones de Alambre de acero inoxidable – Recto, longitud 14", redondo – Tono oro

5. Opciones de Alambre de acero inoxidable – Recto, longitud 14", rectangular – Estándar

Opciones de Alambre de acero inoxidable – Recto, longitud 14", rectangular – Tono oro

Alambre de acero inoxidable multifilamento – Streight™ - Trama rectangular superior/inferior – Forma I

Alambre de acero inoxidable multifilamento – Redondo retorcido – Superior/inferior – Forma I.

Alambre de acero inoxidable multifilamento – Redondo retorcido – Superior/inferior – Bonwill-Hawley.

Alambre de acero inoxidable multifilamento – Redondo retorcido – Superior/inferior – Recto.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.N.M.I.T.

Alambre de acero inoxidable multifilamento - Rectangular retorcido - Superior/inferior - Bonwill-Hawley.

Alambre de acero inoxidable multifilamento - Co-axial redondo, superior/inferior - Forma I.

Alambre de acero inoxidable multifilamento - Co-axial redondo, superior/inferior - Recto.

Alambre de acero inoxidable multifilamento - Co-axial redondo, superior/inferior - Bobina

Alambre de cromo-cobalto azul multifásico - Bonwill Hawley.

Alambre de cromo-cobalto azul multifásico - Tramos rectos.

Alambre de cromo-cobalto azul multifásico - Alambre de retención.

Resortes NiTi - Resortes de fuerza ajustable, espiral abierto - Rollos de 15'

Resortes NiTi - Resortes de fuerza ajustable, espiral abierto - Tramos rectos 7"

Resortes NiTi - Resortes de fuerza ajustable, espiral cerrado con ojal.

Resortes de acero inoxidable - espiral cerrado embobinado.

Resortes de acero inoxidable - espiral abierto embobinado.

Resortes de acero inoxidable - espiral cerrado recto.

Componentes de acero inoxidable - alambre para retenedores.

Componentes de acero inoxidable - agarraderas esféricas para retenedores.

Componentes de acero inoxidable - juegos de agarraderas esféricas para retenedores.

Componentes de acero inoxidable - forma de retenedor Hawley envolvente.

Alambre de ligadura - Gancho Kobayashi

Alambre para ligadura - Gancho Kobayashi estándar

Alambre para ligadura - Gancho Kobayashi retorcido

Alambre para ligadura - Gancho Kobayashi retorcido, color marfil.

Alambre para ligadura - Preformado.

Alambre de ligadura - Retorcido

Alambre de ligadura - Retorcido dorado

Alambre de ligadura - Rollo de 1 lb



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.I.

Alambre de ligadura – Rollo de 5 lb

Ligadura metálica – Ligadura metálica a granel

Auxiliares y otros productos metálicos – MonkeyHook®

Auxiliares y otros productos metálicos – Arco con torsión flexible auxiliar

Auxiliares y otros productos metálicos – Perno de alimentación.

Resorte separador con cierre automático – Mediano.

Resorte separador con cierre automático – Largo.

Auxiliares y otros productos de alambre – Resorte de rotación – Derecho.

Auxiliares y otros productos de alambre – Resorte de rotación – Izquierdo.

Resorte recto con retención de protección – 4 espirales – Derecho.

Resorte recto con retención de protección – 4 espirales – Izquierdo.

Auxiliares y otros productos de alambre – Kilroy Spring 1 – Lingual

Auxiliares y otros productos de alambre – Kilroy Spring 1 – Bucal

Auxiliares y otros productos de alambre – Resorte de cumplimiento - Derecho

Auxiliares y otros productos de alambre – Resorte de cumplimiento -
Izquierdo

Soporte para alambres – Soporte natural para arcos.

Soporte para alambres – Soporte para arcos Bonwill Hawley.

Soporte para alambres – Bastidor de arco metálico individual.

Elastoméricos

The Wildlife Series™ - Elásticos de látex

The Wildlife Series™ - Extra fuertes y tamaños máximos

The Wildlife Series™ - Elásticos de látex neón.

The Wildlife Series™ - Opción paquete más pequeño.

The Wildlife Series™ - Dispensador de cajas de elásticos preempaquetados.

The Wildlife Series™ - Elásticos a granel en bolsas.

The Wildlife Series™ - Elásticos sin látex

Ligaduras de color – 6 Sticks™

Ligaduras de color – Unisticks™

Ligaduras de color – 10 Ring™ |

Ligaduras de color – Juego de 6 Sticks™ surtidas





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Ligaduras de color – Caja de almacenamiento 6 Sticks™
Ligaduras de color – Unisticks™ - bolsa con colores surtidos
Ligaduras de color – Unisticks™ - bolsa con colores pastel surtidos.
Ligaduras de color – Unisticks™ - juego de colores claros surtidos.
Ligaduras de color – Unisticks™ - juego de colores oscuros surtidos.
Ligaduras de color – Ligaduras de plástico a granel.
Cadena plástica de color – Cerrada.
Cadena plástica de color – Corta
Cadena plástica de color – Larga
Cadena plástica de color – Colorímetro (Color Wheel™)
Cadena de memoria.
Color Wheel™ (Colorímetro) para ligaduras y cadenas.
Separadores – X-Ring.
Separadores – Azul radio opacos.
Separadores – Blancos
Cúñas de rotación transparentes.
Tubos E-Z Tie™
Hilo plástico
Protector de arcos.
Fijos y funcionales:
MiniScope Telescoping Herbst®
Juego MiniScope con Rollo Band.
Hanks Telescoping Herbst® (HTH).
HTH con Juego Rollo Band.
Configuraciones Rollo Band especiales.
Aparato Herbst® - Juego Herbst®
Componentes para reposición de aparatos Herbst®
Coronas Mini Skirt.
Corona Mini Skirt – Juego.
Coronas Mini Skirt con tuerca abarrilada.
Coronas Mini Skirt con tuerca abarrilada. Juego.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.N.M.I.T.

Configuraciones de las coronas Mini Skirt – Tuerca universal + gancho

Configuraciones de las coronas Mini Skirt – Tuerca abarrilada + tubo 3,2 mm
0,018

Configuraciones de las coronas Mini Skirt – Tuerca abarrilada + tubo 3,2 mm
0,022

Familia Jet – Juego de Distal Jet

Familia Jet – Modelo de consulta Distal Jet.

Familia Jet – Juego Mesial Jet.

Familia Jet – Modelo de consulta dual – Mesial Jet / Uprighter Jet.

Familia Jet – Juego Uprighter Jet.

Familia Jet – Juego de resortes Jet.

Familia Jet – Modelo de consulta, Spring Jet 1 (expansión dentaria).

Familia Jet – Modelo de consulta, Spring Jet 2 (expansión ortopédica).

Familia Jet – Piezas para reposición individual.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper – Juego Jasper
Jumper.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper – Jasper Jumper,
tamaños individuales.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper. Modelo de consulta
Jasper Jumper.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Juego Gentle Jumper

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper – Gentle Jumper,
tamaños individuales.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper – Juego de alambres
seccionales.

Jones Jig – Juego Jones Jig de 0,018 – Tubo extraoral oclusal.

Jones Jig – Juego Jones Jig de 0,018 – Tubo extraoral gingival.

Jones Jig – Juego Jones Jig de 0,022 – Tubo extraoral oclusal.

Jones Jig – Juego Jones Jig de 0,022 – Tubo extraoral gingival.

Jones Jig – Reposición de componentes.

Jones Jig – Modelo de consulta.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Juego Rapid Molar Intruder™

Rapid Molar Intruder™ - Reposición de componentes.

Arcos palatinos – Arco palatino Goshgarian.

Arcos palatinos – Juego de Arcos palatinos Goshgarian.

Arco palatino con ojal en reversa.

Arcos palatinos – Juego de arcos palatinos con ojal en reversa.

Quad Helix – Recto

Quad Helix – Curvo

Correctores y paralabios Clase III – Juego Quick Fix.

Correctores y paralabios Clase III – Quick Fix. Reposición de componentes

Correctores y paralabios Clase III – Protector YC3™

Correctores y paralabios Clase III – Paralabios con gancho para canino

Correctores y paralabios Clase III – Paralabios sin gancho para canino

Correctores y paralabios Clase III – Juego de paralabios – surtidos.

Correctores y paralabios Clase III – Paralabios con gancho - surtido

Correctores y paralabios Clase III – Paralabios Alexander con gancho

Correctores y paralabios Clase III – Paralabios Alexander sin gancho

Tornillos de expansión intraoral – Tornillo de expansión estándar.

Tornillos de expansión intraoral – Tornillo de expansión media.

Tornillos de expansión intraoral – Microtornillo de expansión

Tornillos de expansión intraoral – Minitornillo de expansión higiénica rápida.

Tornillos de expansión intraoral – Llave para tornillos de expansión.

Retenedores y aparatos – Juego de retenedores adhesivos – Central a central.

Retenedores y aparatos – Juego de retenedores adhesivos – Lateral a lateral.

Retenedores y aparatos – Juego de retenedores adhesivos – Canino a canino.

Retenedores y aparatos – Mantenedor de espacio adhesivo.

Retenedores y aparatos – Corrector lingual adhesivo.

Retenedores y aparatos – Cierre de diastema.

Retenedores y aparatos – Juego de cierres de diastema.

Retenedores y aparatos – Planos de mordida.

Ortodoncia postural – Juego de paralabios.

8.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Ortodoncia postural – Reposición de componentes de parabolios.

Ortodoncia postural – Juego avanzado mandibular / Tamaño 1.

Ortodoncia postural – Juego avanzado mandibular / Tamaño 2.

Ortodoncia postural – Posturador miniactivador (M.A.P., por su sigla en inglés).

Ortodoncia postural – Aparato interoclusal (I.O.A, por su sigla en inglés).

Topes y ganchos

Gancho para arcos, quirúrgico y rectangular – Ganchos quirúrgicos.

Gancho para arcos, quirúrgico y rectangular – Ganchos para arcos.

Gancho para arcos, quirúrgico y rectangular – Alicates para doblar ganchos deslizantes.

Topes y ganchos redondos y rectangulares – Pinzables

Topes y ganchos redondos y rectangulares – Soldables.

Gancho en forma de "S" (Monkey Hook)

Juego de cierre de arco sin ganchos.

Juego de cierre de arco con gancho.

Cierre de arco, reposición de componentes.

Instrumentos:

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúter de extremo distal.

5. Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúter de extremo distal – Mango largo.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúter de extremo distal – Cabeza delgada.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúter de extremo distal – Cabeza larga y delgada.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúteres de pernos y ligaduras.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúteres de minipernos y ligaduras.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúteres de micropernos y ligaduras.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúteres de alambre duro.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre y formar lazos de omega NiTi.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre - Pico pajarito.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre - Pico pajarito, punta cónica.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre - alambre blando.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre - Arco rect. Estilo tweed.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre - Tres puntas.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre - NiTi con tres puntas.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates utilitarios - Alicates Weingart .

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates utilitarios - Alicates Weingart - Mango largo.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates utilitarios - Alicates Weingart - Puntas delgadas.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Abrazaderas (Brackets) de metal pegados directamente

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Para despegar abrazaderas "Radiance"

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Para despegar abrazaderas de cerámica.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Para quitar bandas posteriores.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Alicates para quitar linguales.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Alicates para quitar adhesivos.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.I.

Masterline Instruments™ - Cortadores - Cortador distal con sujetador de seguridad.

Masterline Instruments™ - Cortadores - Cortador distal con sujetador de seguridad, Mango largo

Masterline Instruments™ - Cortadores - - Cortador distal con sujetador de seguridad para alambre pequeño.

Masterline Instruments™ - Cortadores - Cortador de extremo distal.

Masterline Instruments™ - Cortadores - Cortador estándar de ligaduras y pernos

Masterline Instruments™ - Cortadores - Cortador de minipernos y ligaduras

Masterline Instruments™ - Cortadores - Cortador de alambre duro.

Masterline Instruments™ - Cortadores - En ángulo de 15° - Cortador de alambre duro.

Masterline Instruments™ - Cortadores - En ángulo de 15° - Cortador alambre duro de cromo.

Masterline Instruments™ - Cortadores - En ángulo de 15° - Cortador alambre duro, negro anodizado.

Masterline Instruments™ - Cortadores - Cortador de Ligaduras de 45°

Masterline Instruments™ - Cortadores - Instrumento para cortar bandas

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre - Alicates para alambre blando.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre - Alicates para alambre blando Súper Scoop - Estilo Begg.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambres - Alambres para formar bucles - Estilo Tweed.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre - Alicates para formar bucles omega - Estilo Tweed.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre - Alicates pico de pájaro

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre - Alicates para dobleces en V.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para formar arcos linguales

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para formar arcos rectangulares.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates de tres puntas recto.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates Jarabak

Masterline Instruments™ Alicates para doblar alambre – Alicates utilitarios rectos estilo How.

Masterline Instruments™ -Alicates para doblar alambre – Alicates utilitarios para compensar, estilo How.

Masterline Instruments™ Alicates para doblar alambre – Alicates asentador de bandas.

Masterline Instruments™ -Alicates para doblar alambre – Alicates utilitarios Weingart de 45°

Masterline Instruments™ -Alicates para doblar alambre – Alicates Weingart.

Masterline Instruments™ - Alicates Weingart – Mango largo.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para bucle Nance.

6 Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates estilo óptico.

Alicates para doblar alambre – Alicates para realizar lazos Nance uniformes.

Alicates para doblar alambre – Alicates para contornear bandas.

Alicates para doblar alambre – Alicates para tajar huecos.

Alicates para doblar alambre – Alicates para contornear de la Rosa – 0,016/0,018

Alicates para doblar alambre – Alicates para contornear de la Rosa – 0,018/0,022

Alicates para doblar alambre – Alicates para contornear de la Rosa – Llaves de reemplazo 0,016/0,018



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.I.

Alicates para doblar alambre – Alicates para contornear de la Rosa – Llaves de reemplazo 0,018/0,022

Masterline Instruments™ - Alicates para remover abrazaderas (brackets) de cemento directo (AD) – Estrecho.

Masterline Instruments™ - Alicates para remover abrazaderas (brackets) de cemento directo – Ancho.

Masterline Instruments™ - Punta de reposición de alicates para remover abrazaderas de cemento directo – Estrecha.

Masterline Instruments™ -- Punta de reposición de alicates para remover abrazaderas de cemento directo – Ancha.

Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) – Extractor de abrazaderas de AD con almohadilla – Estrecho.

Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Extractor de abrazaderas de AD con almohadilla – Ancho.

Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Punta de reemplazo para AD con almohadilla – Estrecha.

Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Punta de reemplazo para AD con almohadilla – Ancha.

Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Extractor de abrazaderas de cemento directo.

Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Alicates para extracción lingual.

Instrumentos para ligaduras – Director de ligaduras.

Instrumentos para ligaduras – Director y extractor de ligaduras Speedo.

Instrumentos para ligaduras – Explorador con un extremo

Instrumentos para ligaduras – Director de ligaduras Speedo.

Instrumentos para ligaduras – Separador de módulos de fuerza.

Instrumentos para ligaduras – Pinzas para enlazar ligaduras tipo Coon.

Masterline Instruments™ - Extractores de bandas – Instrumento para cortar bandas



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

Masterline Instruments™ - Extractores de bandas - Extractor de bandas posteriores - Punta corta

Masterline Instruments™ - Extractores de bandas - Extractor de bandas posteriores - Punta larga.

Masterline Instruments™ - Extractores de bandas - Extractor de bandas posteriores - Punta extra-larga.

Masterline Instruments™ - Instrumentos para especialidades - Alicates para cortar ganchos quirúrgicos.

Masterline Instruments™ - Instrumentos para especialidades - Alicates para cortar ganchos de arcos.

Masterline Instruments™ - Instrumentos para especialidades - Pinzas para quitar encapsulados.

Masterline Instruments™ - Instrumentos para especialidades - Alicates para quitar adhesivos.

Masterline Instruments™ - Instrumentos para especialidades - Almohadillas de reemplazo esterilizables con calor.

Masterline Instruments™ - Instrumentos para especialidades - Puntas de reemplazo y llave inglesa.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Soportes para abrazaderas cementadas.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Soportes para abrazaderas cementadas - Juego de 6.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Soportes para abrazaderas cementadas - con punta curva.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Soportes para abrazaderas cementadas - con punta para alineación.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Soportes para abrazaderas cementadas - Bajo perfil de cementado directo Hu-Friedy.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Soportes para abrazaderas cementadas - Punta fina.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Posicionador positivo.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.I.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Asentador de bandas de doble extremo.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Barras de mordida calor elevado.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Empujador de bandas "Mallet Handled".

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Pinzas College 6"

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Pinzas para colocar apósitos Perry

Instrumentos para ligaduras – Soporte para agujas Mathieu.

Instrumentos para ligaduras – Mini-soporte para agujas Mathieu

Instrumentos para ligaduras – Soporte para agujas Mathieu – Estrecho.

Instrumentos para ligaduras – Pinzas Smaha – Rectas

Instrumentos para ligaduras – Hemostáticos.

Instrumentos para ligaduras – Hemostáticos. Punta fina.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Distal Twister™, Pequeño.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Distal Twister™, Grande.

Instrumentos para especialidades – Removedor de esmalte ajustable, de grano fino

§ Instrumentos para especialidades – Removedor de esmalte ajustable, de grano mediano.

Instrumentos para especialidades – Removedor de esmalte ajustable, de grano grueso

Instrumentos para especialidades – Removedor de encapsulado convertible.

Instrumentos para especialidades – Guía para colocación de abrazaderas Alexander

Instrumentos y accesorios para especialidades – Calibre posicionador Dontrix.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Espátula.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Extractor de adhesivo de cementado directo.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Asentador de bandas / Raspador de cemento.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Espejo bucal de acero inoxidable.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Espejo bucal de plástico.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Cortador de alambre de alto rendimiento.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Soporte para alicates.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Bandeja para instrumental.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Calibre Boon.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Lubricante para instrumental Medic 365.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Micrómetro.

Instrumentos autolingantes – Instrumento Empower.

Instrumentos autolingantes – Instrumentos Vision LP

Instrumentos autolingantes – Instrumentos T3.

Instrumentos Harmony™ - Abierto/cerrado.

Instrumentos Harmony™ - Explorador Hu-Friedy / Director de ligaduras.

Instrumentos Harmony™ - Raspador/empujador de bandas.

Accesorios para pacientes – Botones ortodóncicos Smile.

Cera ortodóncica con siliconas.

Abrazaderas para centrales maxilares – Angulación diagonal.

Abrazaderas para centrales maxilares – Triple acción.

Abrazaderas para centrales maxilares – Triple acción, ranura vertical.

Abrazaderas para laterales maxilares – Angulación diagonal.

Abrazaderas para laterales maxilares – Triple acción.

Abrazaderas para laterales maxilares – Triple acción, ranura vertical.

Abrazaderas para caninos maxilares – Angulación diagonal, torsión diagonal.

Abrazaderas para caninos maxilares – Triple acción.

Abrazaderas para caninos maxilares – Triple acción, ranura vertical.

Abrazaderas para premolares maxilares – Torsión diagonal.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- Abrazaderas para premolares maxilares – Torsión diagonal, ranura vertical.
- Abrazaderas para premolares maxilares – Edgewise (de canto).
- Abrazaderas para premolares maxilares – Ranura vertical.
- Abrazaderas para anteriores maxilares – Edgewise (de canto).
- Abrazaderas para anteriores maxilares – Ranura vertical.
- Abrazaderas para caninos mandibulares – Torsión diagonal, angulación diagonal.
- Abrazaderas para caninos mandibulares – Triple acción.
- Abrazaderas para caninos mandibulares – Triple acción, ranura vertical.
- Abrazaderas para premolares mandibulares – Torsión diagonal.
- Abrazaderas para premolares mandibulares – Torsión diagonal, ranura vertical.
- Abrazaderas para premolares mandibulares – Edgewise (de canto).
- Abrazaderas para premolares mandibulares – Ranura vertical.
- Abrazaderas Lewis – Torsión diagonal.
- Abrazaderas Lewis – Torsión en ranura.
- Abrazaderas Lewis – Edgewise (de canto).
- Abrazaderas Lewis – Ranura vertical.
- Abrazaderas Lang – Torsión diagonal, Angulación diagonal.
- Abrazaderas Lang – Torsión diagonal.
- Abrazaderas Lang – Torsión en ranura.
- Abrazaderas Edgewise (de canto) – Estándar.
- Abrazaderas Edgewise (de canto) – Ranura profunda.
- Abrazaderas Edgewise (de canto) – Torsión sin torsión.
- Abrazaderas Edgewise (de canto) – Ranura vertical
- Abrazaderas Edgewise (de canto) – Torsión ranura vertical.
- Período de vida útil: 10 años.
- Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.
- Nombre del fabricante: 1) AMERICAN ORTHODONTICS.
2) AMERICAN ORTHODONTICS.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Lugar/es de elaboración: 1) 1536 N. 18th Street Sheboygan, WI 53081
Estados Unidos.

2) 1919 N. 18th Street Sheboygan, WI 53081 Estados Unidos.

Expediente N° 1-47-18051-12-5

DISPOSICIÓN N°

2252


Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.




Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

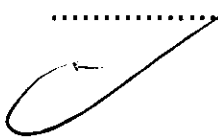.....**2252**.....




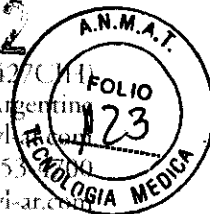
Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2252
Av. Elcano 4933 (C1427CH)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553...
ventas@acryl-ar.com



PROYECTO DE ROTULO

BRACKETS, TUBOS, BANDAS, ALAMBRES, Y ACCESORIOS ORTODONTICOS

1. Fabricado por 1) American Orthodontics – 1536 N. 18th Street, Sheboygan, WI 53081 Estados Unidos. 2) American Orthodontics – 1919 N. 18th Street, Sheboygan, WI 53081 Estados Unidos.
2. Importado por Acryl-ar SRL – Av. Elcano 4593 – Cap Fed
3. Producto para uso dental solamente – Aditamentos para Ortodoncia: Marca: American Orthodontics.

Modelos:

Abrazaderas [Brackets]

Abrazaderas autoligables

Vision LP – Sistema Damon*

Vision LP - Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*

T3 - Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*

T3 – Sistema Roth*

T3 - Sistema Andrews*

Empower – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*

Empower – Sistema Roth*

Empower – opciones de baja torsión

Empower – Sistema Damon* modificado – Maxilar

Empower – Sistema Damon* modificado – Mandibular

Empower – Sistema Roncone* modificado

Empower – sistema de ranura vertical Glanelly

Empower – Maxilar 1er. molar – Cementado directo

Empower – Maxilar 1er. molar – Soldable

Empower – Mandibular 1er. molar – Cementado directo

Empower – Mandibular 1er. molar – Soldable

Empower – Typodents

Empower – Tarjeta para carpeta de detalles

Abrazaderas [Brackets] metálicas

Bajo perfil – Sistema Roth de bajo perfil

Bajo perfil – Sistema Alexander* de bajo perfil

Bajo perfil – Sistema de arco recto modificado de bajo perfil

Bajo perfil – Sistema Roth de ranura en V de bajo perfil


SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA


ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo



2252
Av. Elcano 933 (C1271HJ)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-...
ventas@acryl-ar.com



Bajo perfil – Sistema de ranura vertical bidimensional Glanelly de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema Bioprogresivo de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema Bioprogresivo modificado de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi* de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema de ranura en V Butterfly de bajo perfil
Bajo perfil – opciones de sistema de bajo perfil
Series Mini Master - Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
Series Mini Master – Sistema Roth
Series Mini Master – Sistema de arco recto
Serie Mini Master - Sistema de arco recto modificado
Series Mini Master – Sistema Alexander*
Series Mini Master – Sistema Alexander* de estabilidad a largo plazo
Series Mini Master – Sistema de ranura vertical McLaughlin, Bennett, Trevisi*
Series Mini Master – Sistema de ranura vertical Glanelly Bio-dimensional
Series Mini Master – Sistema de ranura vertical
Series Mini Master – Sistema Bioprogresivo
Series Mini Master – Sistema Bioprogresivo modificado
Series Mini Master – The SEBA System/prescripción Asiática
Series Mini Master – el sistema ProTorque prescripción /latino/hispano
Series Mini Master – opciones de las series – Maxilar
Series Mini Master – opciones de las series – Mandibular
Series Master – Sistema Roth*
Series Master – Sistema de arco recto
Series Master – Sistema Bioprogresivo
Series Master – Sistema Alexander*
Series Master – Sistema IBD (distancia inter-abrazadera) Sondhl*
Series Master - Sistema IBD (distancia inter-abrazadera)
Series Master – Sistema de microadhesión
Series Master – opciones de las series – Maxilar/mandibular
Mini Standard Edgewise
Mini Tweed
Abrazaderas cosméticas
Radiance – Sistema Roth*
Radiance – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
Radiance – Sistema Alexander LTS

SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA

ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2252
Av. Elcano 4953 (C1414EJH)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553 1230
ventas@acryl-ar.com



Radiance – Ranura en V
Virage – Sistema Roth*
Virage – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
Virage – Sistema Bio-progresivo
Virage – el sistema SEBA – evidencia Sugiyama – basado en la prescripción asiática
20/40 – Sistema Roth*
20/40 – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
20/40 – Sistema Standard Edgewise
Sierra – Sistema Roth*
Sierra classic – Sistema Roth*
Silkon Plus - Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
Silkon Plus – Sistema de arco recto
Forever Gold – Sistema Roth* de bajo perfil
Forever Gold – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi* de bajo perfil
Series Mini Master Forever Gold - Sistema Roth*
Series Mini Master Forever Gold – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
Series Mini Master Forever Gold – Sistema Alexander*
Series Mini Master Forever Gold enchapado en oro 24k – Sistema Roth*
Series Mini Master Forever Gold – sistema de ranura vertical
Series Mini Master Forever Gold – tubos molares no convertibles
Series Mini Master Forever Gold – tubos molares convertibles
Stealth – Sistema lingual
Stealth Mordida plana
Abrazaderas cosméticas clásicas
Abrazaderas Empower C
Empower C – Empower Typodonts
Tubos de cementado directo
Empower SL 1ro. maxilar – autoligado
Empower SL 1ro. mandibular – autoligado
Tubo delgado 1er. o 2do. maxilar – no convertible
Tubo delgado 1er. o 2do. mandibular – no convertible
1er. molar maxilar – no convertible
1er. molar maxilar – convertible
1er. molar mandibular – no convertible
1er. molar mandibular – convertible


SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA


ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO REPRESENTANTE
CHRISTIAN BOICHENCO


ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2252

Av. Elcano 4933 (C1427 EIM)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4553
ventas@acryl-ar.com

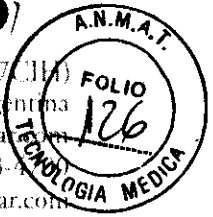

2do. molar maxilar – no convertible
2do. molar mandibular – no convertible
2do. molar maxilar – no convertible 2 mm
2do. molar mandibular – no convertible 2 mm
Tubos premolares para cementado directo, maxilar/mandibular
Forever Gold – tubos bucales

Empower – tubos molares

Bandas y fijadores

MR3 – 1er. molar – superior

MR3 – 1er. molar – inferior

Maximun Retention™ – Master Series – MR1 bandas 1er. molar – superior

Maximun Retention™ – Master Series – MR1 bandas 1er. molar – inferior

Maximun Retention™ – Master Series – MRI-32 bandas 1er. molar – superior

Maximun Retention™ – Master Series – MRI-32 bandas 1er. molar – inferior

Maximun Retention™ – Master Series – MR1 bandas 2do. molar – superior

Maximun Retention™ – Master Series – MR1 bandas 2do. molar – inferior

Maximun Retention™ – Mini Master Series – MR2 1er. molar – superior

Maximun Retention™ – Mini Master Series – MR2 1er. molar – inferior

Maximun Retention™ – Mini Master Series – MR2 2do. molar – superior

Maximun Retention™ – Mini Master Series – MR2 2do. molar – inferior

Maximun Retention™ – Bandas para premolar superior – MR 1er. y 2do.

Maximun Retention™ – Bandas para premolar inferior – MR 1er. premolar.

Maximun Retention™ – Bandas para premolar inferior – MR 2do. premolar.

Moldeados – Master Series – 1er. molar – templado normal – superior

Moldeados – Master Series – 1er. molar – templado normal – inferior

Moldeados – Master Series – 1er. molar serie de línea dura – superior

Moldeados – Master Series – 1er. molar serie de línea dura – inferior

Moldeados – Master Series – 2do. molar – superior

Moldeados – Master Series – 2do. molar – inferior

Moldeados – Mini master Series – 1er. molar – superior

Moldeados – Mini master Series – 1er. molar – inferior

Moldeados – Mini master Series – 2do. molar – superior

Moldeados – Mini master Series – 2do. molar – inferior

Moldeados – Micro Bands – 1er. molar – superior

Moldeados – Micro Bands – 1er. molar – inferior

SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TÉCNICA

ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BORTOLUCCI

2252

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo



Av. Elcano 4933 (C1427UJH)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4777
ventas@acryl-ar.com



- Moldeados – Premolar – 1ra. y 2da. premolar – superior
- Moldeados – Premolar – 1ra. y 2da. premolar – inferior
- Anteriores – canino – superior
- Anteriores – bandas caninos – inferior
- Anteriores – bandas centrales – superior
- Anteriores – bandas centrales – inferior
- Anteriores – bandas laterales – superior
- Anteriores – bandas laterales – inferior
- Anteriores – bandas anteriores inferiores
- Bandas Rollo – Lisas – superior derecho
- Bandas Rollo – Lisas – superior izquierdo
- Bandas Rollo – Lisas – inferior derecho
- Bandas Rollo – Lisas – inferior izquierdo
- Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – tuerca universal
- Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – gancho + tuerca universal
- Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – tuerca cilíndrica
- Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – tuerca cilíndrica + 3,2 mm
- Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – barra Cantilever
- Material y almacenamiento de la banda – banda en bruto
- Material y almacenamiento de la banda – tira
- Material y almacenamiento de la banda – enrollado
- Material y almacenamiento de la banda – cementado directo o Kit Box para almacenamiento de la banda
- Material y almacenamiento de la banda – Kit Box para almacenamiento apilable
- Material y almacenamiento de la banda – caja para almacenamiento de la banda
- Posicionamiento estándar del aditamento lingual – revestimiento
- Posicionamiento estándar del aditamento lingual – ojales
- Posicionamiento estándar del aditamento lingual – gancho bola
- Posicionamiento estándar del aditamento lingual – botones
- Posicionamiento estándar del aditamento lingual – abrazadera
- Posicionamiento estándar del aditamento lingual – torres elásticas
- Posicionamiento estándar del aditamento lingual – torres para asentamiento
- Aditamentos linguales
- Aparatos – Kit de retenedores adhesivos – central – central
- Instrumentos – Kit de retenedores adhesivos – central – central

SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA


ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO REPRESENTANTE
CHRISTIAN BOICHENCO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo


Whip Mix

2052
Av. Elcano 4933 (C1427CMA)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553...
ventas@acryl-ar.com

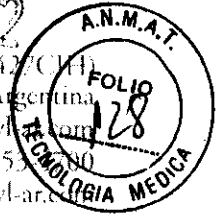

Instrumentos – Kit de retenedores adhesivos – lateral – lateral
Instrumentos – Kit de retenedores adhesivos – cúspide – cúspide
Instrumentos – planos de mordida – plano de mordida corto
Instrumentos – planos de mordidas – plano de mordida largo
Instrumentos – corrector lingual
Instrumentos – cierre de diastema - resorte
Instrumentos – cierre de diastema – tubo cementado directo sobre almohadilla
Instrumentos – cierre de diastema – juego de diastemas
Tubos y revestimientos – con muesca de enganche
Tubos y revestimientos – ranurado sin muesca de enganche
Tubos y revestimientos – ranurado con muesca de enganche
Tubos y revestimientos – ranurado con muesca de enganche y barra mesial-distal
Tubos y revestimiento – ranurado con rotación y gancho bola distal
Aditamentos – ojalillos – con forma de tira soldable
Aditamentos – ojalillos – adhesivos
Aditamentos – ojalillos – ojal en espiral adhesivo
Aditamentos – abrazadera de bajo perfil – soldable
Aditamentos – abrazadera de bajo perfil – adhesiva
Aditamentos – botones – soldables
Aditamentos – botones adhesivos
Aditamentos – tacos de base
Aditamentos – cuñas en ala de gaviota- soldable
Aditamentos – cuñas en ala de gaviota - adhesiva
Aditamentos – torres elásticas - soldable
Aditamentos – torres elásticas – adhesiva
Aditamentos – gancho auxiliar
Aditamentos – gancho bola
Maxilar 1er. molar – triple convertible – 3,5 mm Mini Master
Maxilar 1er. molar - triple convertible – 4,2 mm Master
Maxilar 1er. molar - triple convertible – 4,2 mm Cast
Maxilar 1er. molar – triple convertible – Tubos Dr. Korn
Maxilar 1er. molar – doble convertible – 3,5 mm Mini Master
Maxilar 1er. molar - doble convertible – 4,2 mm Master
Maxilar 1er. molar - doble convertible – 4,2 mm Cast
Maxilar 1er. molar – triple convertible – 3,5 mm Mini Master


SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA


ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOUCHENGO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2/2

Av. Elcano 4933 (C1427CH)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-
ventas@acryl-ar.com



- Maxilar 1er. molar - triple convertible - 4,2 mm Master
- Maxilar 1er. molar - triple convertible - 4,2 mm Cast
- Maxilar 1er. molar - triple convertible - 3,5 mm Mini Master
- Maxilar 1er. molar - triple convertible - 4,2 mm Master
- Maxilar 1er. molar - triple convertible - 4,2 mm Cast
- Maxilar 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Empower SL
- Maxilar 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Vision LP SL
- Maxilar 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Bajo perfil
- Maxilar 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Mini Master
- Maxilar 1er. molar - simple convertible - 4,2 mm Cast
- Mandibular 1er. molar - doble convertible - 3,5 mm Mini Master
- Mandibular 1er. molar - doble convertible - 4,2 mm Master
- Mandibular 1er. molar - doble convertible - 4,2 mm Cast
- Mandibular 1er. molar - triple convertible - Lip Jumper tube - 3,5 mm Mini Master
- Mandibular 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Empower SL
- Mandibular 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Vision LP SL
- Mandibular 1er. molar - simple convertible - 3,5 mm Mini Master
- Mandibular 1er. molar - simple convertible - 4,2 mm Master
- Mandibular 1er. molar - simple convertible - 4,2 mm Cast
- Maxilar 1er. molar - triple no convertible - 4,2 mm Cast
- Maxilar 1er. molar - doble no convertible - 4,5 mm bajo perfil
- Maxilar 1er. molar - doble no convertible - 4,2 mm Cast
- Maxilar 1er. molar - simple no convertible - 4,5 Bajo perfil
- Maxilar 1er. molar - simple no convertible - 4,2 mm Cast
- Mandibular 1er. molar- triple no convertible - Lip Jumper tube - 4,2 mm Cast
- Mandibular 1er. molar - doble no convertible - 4,5 mm bajo perfil
- Mandibular 1er. molar - doble no convertible - 4,2 mm Cast
- Mandibular 1er. molar - doble no convertible - Lip Jumper tube - 4,2 mm Cast
- Mandibular 1er. molar - simple no convertible - 4,5 mm Bajo perfil
- Mandibular 1er. molar - simple no convertible - 4,2 mm Cast
- Maxilar 2do. molar - simple no convertible - 3,2 mm bajo perfil
- Maxilar 2do. molar - simple no convertible - 3,2 mm Cast
- Mandibular 2do. molar - simple no convertible - 3,2 mm bajo perfil
- Mandibular 2do. molar - simple no convertible - 3,2 mm Cast
- Tubos Inconel soldables - tubos redondos y rectangulares

SANDRA BROZ
M.N. 10098
DIRECTORA TÉCNICA

ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO


ACRYL-AR

Representante
Exclusivo



2125

Av. Elcano 4933 (C1427CIV)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-
ventas@acryl-ar.com

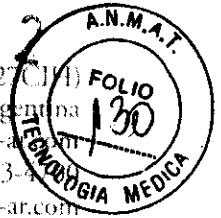

- Tubos Inconel soldables – tubos combinados
- Tubos Inconel soldables – tubos de combinación doble rectangular
- Tubos Inconel maxilares
- Tubos Inconel mandibulares
- Hickam Maxilar/Tubos Inconel mandibular
- Tubos para arcos blandos– simple bajo perfil
- Tubos para arcos blandos– 0° redondo de rotación simple
- Tubos para arcos blandos– 6° rotación soldable 0.036 redondo y rectangular
- Tubos para arcos blandos– 0° rotación soldable 0.036 combinación redondo
- Tubos para arcos blandos– 0° rotación soldable doble combinación
- Fundas linguales – Funda con muesca para enganche
- Fundas linguales – Funda acanalada sin muesca para enganche
- Fundas linguales – Funda acanalada con muesca para enganche y barra mesiodistal
- Fundas linguales – Funda acanalada con rotación y gancho con esfera distal
- Alambre.
- Arco de alambre TriTanium – Forma I
- Arco de alambre TriTanium – Forma III
- Alambre "EverWhite", con memoria, de titanio – Forma I
- Alambre "EverWhite", con memoria, de titanio – Forma III.
- Therma-TI™ Lite – Forma I
- Therma-TI™ Lite – Forma II.
- Therma-TI™ - Forma I.
- Therma-TI™ - Forma III.
- Therma-TI™ "D" – Forma I.
- Therma-TI™ "D" – Forma III.
- Therma-TI™ "D" – VLP sin doblez en la línea media.
- Therma-TI™ "D" – VLP con doblez en la línea media.
- Therma-TI™ "D" – VLP topes precargados.
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Forma I.
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Forma I, con doblez en la línea media.
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Forma I, revestido en oro.
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Forma II.
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Forma III.
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Forma III, con doblez en la línea media
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Bonwill Hawley.


SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA


ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo



2252
Av. Elcano 4953 ((0)27-111)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4700
ventas@acryl-ar.com



- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Curva en reversa
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Curva en reversa, tramo recto
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – VLP sin con doblez en la línea media
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – VLP con doblez en la línea media.
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – VLP topes precargados
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Arco retorcido – Forma 1 – 34 mm
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Arco retorcido – Forma 1 – 38 mm
- Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Arco retorcido – Forma 1 – 28 mm
- Superelastic Options – Longitud recta.
- Superelastic Options – Bobinas.
- Force Two – Alambre con memoria de titanio – Forma I
- Alambre *Beta Titanium* – Forma I.
- Alambre *Beta Titanium* – Forma III
- Alambre *Beta Titanium* – VLP Universal.
- Alambre de acero inoxidable – Forma I.
- Alambre de acero inoxidable – Forma I revestido en oro.
- Alambre de acero inoxidable – Forma II
- Alambre de acero inoxidable – Forma III.
- Alambre de acero inoxidable – Bonwill-Hawley
- Alambre de acero inoxidable – Bonwill-Hawley Gold Tone.
- Alambre de acero inoxidable – VLP de acero inoxidable con espigo
- Alambre de acero inoxidable – VLP de acero inoxidable sin epigo, sin doblez en la línea media.
- Alambre de acero inoxidable – Forma ahusada.
- Alambre de acero inoxidable – Tono oro.
- Opciones de Alambre de acero inoxidable – Arcos ahusados, Forma I.
- Opciones de Alambre de acero inoxidable – Recto, longitud 14", redondo – Estándar
- Opciones de Alambre de acero inoxidable – Recto, longitud 14", redondo – Tono oro
- Opciones de Alambre de acero inoxidable – Recto, longitud 14", rectangular – Estándar
- Opciones de Alambre de acero inoxidable – Recto, longitud 14", rectangular – Tono oro
- Alambre de acero inoxidable multifilamento – Streight™ - Trama rectangular superior/inferior – Forma I
- Alambre de acero inoxidable multifilamento – Redondo retorcido – Superior/inferior – Forma I.
- Alambre de acero inoxidable multifilamento – Redondo retorcido – Superior/inferior – Bonwill-Hawley.
- Alambre de acero inoxidable multifilamento – Redondo retorcido – Superior/inferior – Recto.

SANDRA BROZ
M.N. 70898
DIRECTORA TECNICA

ACRYL-AR S.R.L.

SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2/2

Av. Elcano 4933 (C1427) Ciudad
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4555-1111
ventas@acryl-ar.com



- Alambre de acero inoxidable multifilamento – Rectangular retorcido – Superior/inferior – Bonwill-Hawley.
- Alambre de acero inoxidable multifilamento – Co-axial redondo, superior/inferior - Forma I.
- Alambre de acero inoxidable multifilamento – Co-axial redondo, superior/inferior - Recto.
- Alambre de acero inoxidable multifilamento – Co-axial redondo, superior/inferior - Bobina
- Alambre de cromo-cobalto azul multifásico – Bonwill Hawley.
- Alambre de cromo-cobalto azul multifásico – Tramos rectos.
- Alambre de cromo-cobalto azul multifásico – Alambre de retención.
- Resortes NiTi – Resortes de fuerza ajustable, espiral abierto – Rollos de 15'
- Resortes NiTi – Resortes de fuerza ajustable, espiral abierto – Tramos rectos 7"
- Resortes NiTi – Resortes de fuerza ajustable, espiral cerrado con ojal.
- Resortes de acero inoxidable – espiral cerrado embobinado.
- Resortes de acero inoxidable – espiral abierto embobinado.
- Resortes de acero inoxidable – espiral cerrado recto.
- Componentes de acero inoxidable – alambre para retenedores.
- Componentes de acero inoxidable – agarraderas esféricas para retenedores.
- Componentes de acero inoxidable – juegos de agarraderas esféricas para retenedores.
- Componentes de acero inoxidable – forma de retenedor Hawley envolvente.
- Alambre de ligadura – Gancho Kobayashi
- Alambre para ligadura – Gancho Kobayashi estándar
- Alambre para ligadura – Gancho Kobayashi retorcido
- Alambre para ligadura – Gancho Kobayashi retorcido, color marfil.
- Alambre para ligadura – Preformado.
- Alambre de ligadura – Retorcido
- Alambre de ligadura – Retorcido dorado
- Alambre de ligadura – Rollo de 1 lb
- Alambre de ligadura – Rollo de 5 lb
- Ligadura metálica – Ligadura metálica a granel
- Auxiliares y otros productos metálicos – MonkeyHook®
- Auxiliares y otros productos metálicos – Arco con torsión flexible auxiliar
- Auxiliares y otros productos metálicos – Perno de alimentación.
- Resorte separador con cierre automático – Mediano.
- Resorte separador con cierre automático – Largo.
- Auxiliares y otros productos de alambre – Resorte de rotación – Derecho.
- Auxiliares y otros productos de alambre – Resorte de rotación – Izquierdo.


SANDRA BROZ
M.N. 10898/
DIRECTORA TÉCNICA



ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

22812
Av. Elcano 4933 (C1427CIB)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4553
ventas@acryl-ar.com

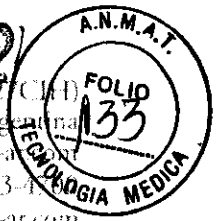


Resorte recto con retención de protección – 4 espirales – Derecho.
Resorte recto con retención de protección – 4 espirales – Izquierdo.
Auxiliares y otros productos de alambre – Kilroy Spring 1 – Lingual
Auxiliares y otros productos de alambre – Kilroy Spring 1 – Bucal
Auxiliares y otros productos de alambre – Resorte de cumplimiento - Derecho
Auxiliares y otros productos de alambre – Resorte de cumplimiento - Izquierdo
Soporte para alambres – Soporte natural para arcos.
Soporte para alambres – Soporte para arcos Bonwill Hawley.
Soporte para alambres – Bastidor de arco metálico individual.

Elastoméricos

The Wildlife Series™ - Elásticos de látex
The Wildlife Series™ - Extra fuertes y tamaños máximos
The Wildlife Series™ - Elásticos de látex neón.
The Wildlife Series™ - Opción paquete más pequeño.
The Wildlife Series™ - Dispensador de cajas de elásticos preempaquetados.
The Wildlife Series™ - Elásticos a granel en bolsas.
The Wildlife Series™ - Elásticos sin látex
Ligaduras de color – 6 Sticks™
Ligaduras de color – Unisticks™
Ligaduras de color – 10 Ring™
Ligaduras de color – Juego de 6 Sticks™ surtidas
Ligaduras de color – Caja de almacenamiento 6 Sticks™
Ligaduras de color – Unisticks™ - bolsa con colores surtidos
Ligaduras de color – Unisticks™ - bolsa con colores pastel surtidos.
Ligaduras de color – Unisticks™ - juego de colores claros surtidos.
Ligaduras de color – Unisticks™ - juego de colores oscuros surtidos.
Ligaduras de color – Ligaduras de plástico a granel.
Cadena plástica de color – Cerrada.
Cadena plástica de color – Corta
Cadena plástica de color – Larga
Cadena plástica de color – Colorímetro (Color Wheel™)
Cadena de memoria.
Color Wheel™ (Colorímetro) para ligaduras y cadenas.
Separadores – X-Ring.
Separadores – Azul radio opacos.


SANDRA BROZ
M.N. 10894
DIRECTORA TÉCNICA


ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOLCHENKO


ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2252

Av. Elcano 4933 (C1477CH)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-1000
ventas@acryl-ar.com

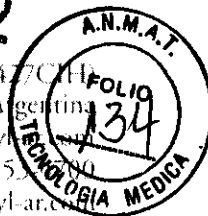

Separadores – Blancos

Cuñas de rotación transparentes.

Tubos E-Z Tie™

Hilo plástico

Protector de arcos.

Fijos y funcionales:

MiniScope Telescoping Herbst®

Juego MiniScope con Rollo Band.

Hanks Telescoping Herbst® (HTH).

HTH con Juego Rollo Band.

Configuraciones Rollo Band especiales.

Aparato Herbst® - Juego Herbst®

Componentes para reposición de aparatos Herbst®

Coronas Mini Skirt.

Corona Mini Skirt – Juego.

Coronas Mini Skirt con tuerca abarrilada.

Coronas Mini Skirt con tuerca abarrilada. Juego.

Configuraciones de las coronas Mini Skirt – Tuerca universal + gancho

Configuraciones de las coronas Mini Skirt – Tuerca abarrilada + tubo 3,2 mm 0,018

Configuraciones de las coronas Mini Skirt – Tuerca abarrilada + tubo 3,2 mm 0,022

Familia Jet – Juego de Distal Jet

Familia Jet – Modelo de consulta Distal Jet.

Familia Jet – Juego Mesial Jet.

Familia Jet – Modelo de consulta dual – Mesial Jet / Uprighter Jet.

Familia Jet – Juego Uprighter Jet.

Familia Jet – Juego de resortes Jet.

Familia Jet – Modelo de consulta, Spring Jet 1 (expansión dentaria).

Familia Jet – Modelo de consulta, Spring Jet 2 (expansión ortopédica).

Familia Jet – Piezas para reposición individual.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper – Juego Jasper Jumper.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper – Jasper Jumper, tamaños individuales.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper. Modelo de consulta Jasper Jumper.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Juego Gentle Jumper

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper – Gentle Jumper, tamaños individuales.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper – Juego de alambres seccionales.


SANDRA BROZ
C.N. 10698
DIRECTORA TÉCNICA

ACRYL-AR S.R.L.

SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOIGUENO

2252



Av. Elcano 4933 (C1427 CIV)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-...
ventas@acryl-ar.com



- Jones Jig – Juego Jones Jig de 0,018 – Tubo extraoral oclusal.
- Jones Jig – Juego Jones Jig de 0,018 – Tubo extraoral gingival.
- Jones Jig – Juego Jones Jig de 0,022 – Tubo extraoral oclusal.
- Jones Jig – Juego Jones Jig de 0,022 – Tubo extraoral gingival.
- Jones Jig – Reposición de componentes.
- Jones Jig – Modelo de consulta.
- Juego *Rapid Molar Intruder™*
- Rapid Molar Intruder™* - Reposición de componentes.
- Arcos palatinos – Arco palatino Goshgarian.
- Arcos palatinos – Juego de Arcos palatinos Goshgarian.
- Arco palatino con ojal en reversa.
- Arcos palatinos – Juego de arcos palatinos con ojal en reversa.
- Quad Helix – Recto
- Quad Helix – Curvo
- Correctores y parabolios Clase III – Juego *Quick Fix*.
- Correctores y parabolios Clase III – *Quick Fix*. Reposición de componentes
- Correctores y parabolios Clase III – Protector YC3™
- Correctores y parabolios Clase III – Parabolios con gancho para canino
- Correctores y parabolios Clase III – Parabolios sin gancho para canino
- Correctores y parabolios Clase III – Juego de parabolios – surtidos.
- Correctores y parabolios Clase III – Parabolios con gancho - surtido
- Correctores y parabolios Clase III – Parabolios Alexander con gancho
- Correctores y parabolios Clase III – Parabolios Alexander sin gancho
- Tornillos de expansión intraoral – Tornillo de expansión estándar.
- Tornillos de expansión intraoral – Tornillo de expansión media.
- Tornillos de expansión intraoral – Microtornillo de expansión
- Tornillos de expansión intraoral – Minitornillo de expansión higiénica rápida.
- Tornillos de expansión intraoral – Llave para tornillos de expansión.
- Retenedores y aparatos – Juego de retenedores adhesivos – Central a central.
- Retenedores y aparatos – Juego de retenedores adhesivos – Lateral a lateral.
- Retenedores y aparatos – Juego de retenedores adhesivos – Canino a canino.
- Retenedores y aparatos – Mantenedor de espacio adhesivo.
- Retenedores y aparatos – Corrector lingual adhesivo.
- Retenedores y aparatos – Cierre de diastema.
- Retenedores y aparatos – Juego de cierres de diastema.

SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA


ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo



72512
Av. Elcano 4933 (C1420EJH)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 455.1111
ventas@acryl-ar.com

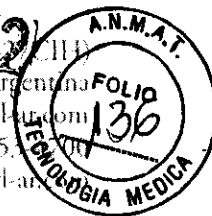

Retenedores y aparatos – Planos de mordida.

Ortodoncia postural – Juego de paralabios.

Ortodoncia postural – Reposición de componentes de paralabios.

Ortodoncia postural – Juego avanzado mandibular / Tamaño 1.

Ortodoncia postural – Juego avanzado mandibular / Tamaño 2.

Ortodoncia postural – Posturador miniactivador (M.A.P., por su sigla en inglés).

Ortodoncia postural – Aparato interoclusal (I.O.A, por su sigla en inglés).

Topes y ganchos

Gancho para arcos, quirúrgico y rectangular – Ganchos quirúrgicos.

Gancho para arcos, quirúrgico y rectangular – Ganchos para arcos.

Gancho para arcos, quirúrgico y rectangular – Alicates para doblar ganchos deslizantes.

Topes y ganchos redondos y rectangulares – Pinzables

Topes y ganchos redondos y rectangulares – Soldables.

Gancho en forma de "S" (Monkey Hook)

Juego de cierre de arco sin ganchos.

Juego de cierre de arco con gancho.

Cierre de arco, reposición de componentes.

Instrumentos:

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúter de extremo distal.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúter de extremo distal – Mango largo.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúter de extremo distal – Cabeza delgada.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúter de extremo distal – Cabeza larga y delgada.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúteres de pernos y ligaduras.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúteres de minipernos y ligaduras.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúteres de micropernos y ligaduras.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúteres de alambre duro.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre y formar lazos de omega NITI.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre - Pico pajarito.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre – Pico pajarito, punta cónica.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre – alambre blando.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre – Arco rect. Estilo tweed.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre – Tres puntas.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre – NITI con tres puntas.

SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA

ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO


ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

225/2

Av. Elcano 4933 (C1427) H14
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4553
ventas@acryl-ar.com

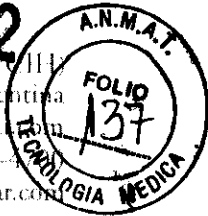

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates utilitarios - Alicates Weingart .

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates utilitarios - Alicates Weingart – Mango largo.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates utilitarios - Alicates Weingart - Puntas delgadas.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Abrazaderas (Brackets) de metal pegados directamente

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas – Para despegar abrazaderas "Radiance"

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas – Para despegar abrazaderas de cerámica.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas – Para quitar bandas posteriores.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Alicates para quitar linguales.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Alicates para quitar adhesivos.

Masterline Instruments™ - Cortadores – Cortador distal con sujetador de seguridad.

Masterline Instruments™ - Cortadores – Cortador distal con sujetador de seguridad, Mango largo

Masterline Instruments™ - Cortadores - – Cortador distal con sujetador de seguridad para alambre pequeño.

Masterline Instruments™ - Cortadores – Cortador de extremo distal.

Masterline Instruments™ - Cortadores – Cortador estándar de ligaduras y pernos

Masterline Instruments™ - Cortadores – Cortador de minipernos y ligaduras

Masterline Instruments™ - Cortadores – Cortador de alambre duro.

Masterline Instruments™ - Cortadores – En ángulo de 15° - Cortador de alambre duro.

Masterline Instruments™ - Cortadores – En ángulo de 15° - Cortador alambre duro de cromo.

Masterline Instruments™ - Cortadores – En ángulo de 15° - Cortador alambre duro, negro anodizado.

Masterline Instruments™ - Cortadores – Cortador de Ligaduras de 45°

Masterline Instruments™ - Cortadores – Instrumento para cortar bandas

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para alambre blando.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para alambre blando Súper Scoop – Estilo Begg.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambres – Alambres para formar bucles – Estilo Tweed.


SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TÉCNICA


ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO


ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2252

Av. Elcano 4933 (C1427CUB)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 45534
ventas@acryl-ar.com

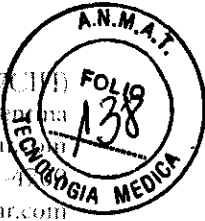

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para formar bucles omega – Estilo Tweed.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates pico de pájaro

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para dobleces en V.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para formar arcos linguales

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para formar arcos rectangulares.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates de tres puntas recto.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates Jarabak

Masterline Instruments™ Alicates para doblar alambre – Alicates utilitarios rectos estilo How.

Masterline Instruments™ -Alicates para doblar alambre – Alicates utilitarios para compensar, estilo How.

Masterline Instruments™ Alicates para doblar alambre – Alicates asentador de bandas.

Masterline Instruments™ -Alicates para doblar alambre – Alicates utilitarios Weingart de 45°

Masterline Instruments™ -Alicates para doblar alambre – Alicates Weingart.

Masterline Instruments™ - Alicates Weingart – Mango largo.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para bucle Nance.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates estilo óptico.

Alicates para doblar alambre – Alicates para realizar lazos Nance uniformes.

Alicates para doblar alambre – Alicates para contornear bandas.

Alicates para doblar alambre – Alicates para tajear huecos.

Alicates para doblar alambre – Alicates para contornear de la Rosa – 0,016/0,018

Alicates para doblar alambre – Alicates para contornear de la Rosa – 0,018/0,022

Alicates para doblar alambre – Alicates para contornear de la Rosa – Llaves de reemplazo 0,016/0,018

Alicates para doblar alambre – Alicates para contornear de la Rosa – Llaves de reemplazo 0,018/0,022

Masterline Instruments™ - Alicates para remover abrazaderas (brackets) de cementado directo (AD) – Estrecho.

Masterline Instruments™ - Alicates para remover abrazaderas (brackets) de cementado directo – Ancho.

Masterline Instruments™ - Punta de reposición de alicates para remover abrazaderas de cementado directo – Estrecha.

Masterline Instruments™ -- Punta de reposición de alicates para remover abrazaderas de cementado directo – Ancha.

SANDRA BROZ
M.N. 10058
DIRECTORA TÉCNICA

ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO



- Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) – Extractor de abrazaderas de AD con almohadilla – Estrecho.
- Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Extractor de abrazaderas de AD con almohadilla – Ancho.
- Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Punta de reemplazo para AD con almohadilla – Estrecha.
- Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Punta de reemplazo para AD con almohadilla – Ancha.
- Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Extractor de abrazaderas de cementado directo.
- Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Alicates para extracción lingual.
- Instrumentos para ligaduras – Director de ligaduras.
- Instrumentos para ligaduras – Director y extractor de ligaduras Speedo.
- Instrumentos para ligaduras – Explorador con un extremo
- Instrumentos para ligaduras – Director de ligaduras Speedo.
- Instrumentos para ligaduras – Separador de módulos de fuerza.
- Instrumentos para ligaduras – Pinzas para enlazar ligaduras tipo Coon.
- Masterline Instruments™ - Extractores de bandas – Instrumento para cortar bandas
- Masterline Instruments™ - Extractores de bandas – Extractor de bandas posteriores – Punta corta
- Masterline Instruments™ - Extractores de bandas – Extractor de bandas posteriores – Punta larga.
- Masterline Instruments™ - Extractores de bandas – Extractor de bandas posteriores – Punta extra-larga.
- Masterline Instruments™ – Instrumentos para especialidades – Alicates para cortar ganchos quirúrgicos.
- Masterline Instruments™ – Instrumentos para especialidades – Alicates para cortar ganchos de arcos.
- Masterline Instruments™ – Instrumentos para especialidades – Pinzas para quitar encapsulados.
- Masterline Instruments™ – Instrumentos para especialidades – Alicates para quitar adhesivos.
- Masterline Instruments™ – Instrumentos para especialidades – Almohadillas de reemplazo esterilizables con calor.
- Masterline Instruments™ – Instrumentos para especialidades – Puntas de reemplazo y llave inglesa.
- Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Soportes para abrazaderas cementadas.

SANDRA FROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA

ACRYL-AR S.R.L.

SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo



2253
Av. Elcano 433 (0142) (C.M.D.)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4553
ventas@acryl-ar.com



- Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Soportes para abrazaderas cementadas – Juego de 6.
- Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Soportes para abrazaderas cementadas – con punta curva.
- Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Soportes para abrazaderas cementadas – con punta para alineación.
- Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Soportes para abrazaderas cementadas – Bajo perfil de cementado directo Hu-Friedy.
- Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Soportes para abrazaderas cementadas – Punta fina.
- Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Posicionador positivo.
- Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Asentador de bandas de doble extremo.
- Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Barras de mordida calor elevado.
- Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Empujador de bandas "Mallet Handled".
- Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Pinzas College 6"
- Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas – Pinzas para colocar apósitos Perry
- Instrumentos para ligaduras – Soporte para agujas Mathieu.
- Instrumentos para ligaduras – Mini-soporte para agujas Mathieu
- Instrumentos para ligaduras – Soporte para agujas Mathieu – Estrecho.
- Instrumentos para ligaduras – Pinzas Smaha – Rectas
- Instrumentos para ligaduras – Hemostáticos.
- Instrumentos para ligaduras – Hemostáticos. Punta fina.
- Instrumentos y accesorios para especialidades – Distal Twister™, Pequeño.
- Instrumentos y accesorios para especialidades – Distal Twister™, Grande.
- Instrumentos para especialidades – Removedor de esmalte ajustable, de grano fino
- Instrumentos para especialidades – Removedor de esmalte ajustable, de grano mediano.
- Instrumentos para especialidades – Removedor de esmalte ajustable, de grano grueso
- Instrumentos para especialidades – Removedor de encapsulado convertible.
- Instrumentos para especialidades – Guía para colocación de abrazaderas Alexander
- Instrumentos y accesorios para especialidades – Calibre posicionador Dontrix.
- Instrumentos y accesorios para especialidades – Espátula.
- Instrumentos y accesorios para especialidades – Extractor de adhesivo de cementado directo.
- Instrumentos y accesorios para especialidades – Asentador de bandas / Raspador de cemento.
- Instrumentos y accesorios para especialidades – Espejo bucal de acero inoxidable.
- Instrumentos y accesorios para especialidades – Espejo bucal de plástico.

SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA

ACRYLAR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2252

Av. Elcano 4933 (C1427CCH)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-...
ventas@acryl-ar.com



- Instrumentos y accesorios para especialidades – Cortador de alambre de alto rendimiento.
- Instrumentos y accesorios para especialidades – Soporte para alicates.
- Instrumentos y accesorios para especialidades – Bandeja para instrumental.
- Instrumentos y accesorios para especialidades – Calibre Boon.
- Instrumentos y accesorios para especialidades – Lubricante para instrumental Medic 365.
- Instrumentos y accesorios para especialidades – Micrómetro.
- Instrumentos autolingantes – Instrumento Empower.
- Instrumentos autolingantes – Instrumentos Vision LP
- Instrumentos autolingantes – Instrumentos T3.
- Instrumentos Harmony™ - Abierto/cerrado.
- Instrumentos Harmony™ - Explorador Hu-Friedy / Director de ligaduras.
- Instrumentos Harmony™ - Raspador/empujador de bandas.
- Accesorios para pacientes – Botones ortodóncicos Smile.
- Cera ortodóncica con siliconas.
- Abrazaderas para centrales maxilares – Angulación diagonal.
- Abrazaderas para centrales maxilares – Triple acción.
- Abrazaderas para centrales maxilares – Triple acción, ranura vertical.
- Abrazaderas para laterales maxilares – Angulación diagonal.
- Abrazaderas para laterales maxilares – Triple acción.
- Abrazaderas para laterales maxilares – Triple acción, ranura vertical.
- Abrazaderas para caninos maxilares – Angulación diagonal, torsión diagonal.
- Abrazaderas para caninos maxilares – Triple acción.
- Abrazaderas para caninos maxilares – Triple acción, ranura vertical.
- Abrazaderas para premolares maxilares – Torsión diagonal.
- Abrazaderas para premolares maxilares – Torsión diagonal, ranura vertical.
- Abrazaderas para premolares maxilares – *Edgewise* (de canto).
- Abrazaderas para premolares maxilares – Ranura vertical.
- Abrazaderas para anteriores maxilares – *Edgewise* (de canto).
- Abrazaderas para anteriores maxilares – Ranura vertical.
- Abrazaderas para caninos mandibulares – Torsión diagonal, angulación diagonal.
- Abrazaderas para caninos mandibulares – Triple acción.
- Abrazaderas para caninos mandibulares – Triple acción, ranura vertical.
- Abrazaderas para premolares mandibulares – Torsión diagonal.
- Abrazaderas para premolares mandibulares – Torsión diagonal, ranura vertical.
- Abrazaderas para premolares mandibulares – *Edgewise* (de canto).

SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA

ACRYL-AR S.R.L.

SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo




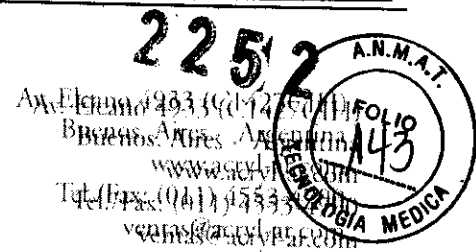
2252
Av. Elcano 4933 (C1427 CHI)
Buenos Aires - Argentina
www.acrylar.com
Tel./Fax: (011) 4551-8000
ventas@acrylar.com



- Abrazaderas para premolares mandibulares – Ranura vertical.
 - Abrazaderas Lewis – Torsión diagonal.
 - Abrazaderas Lewis – Torsión en ranura.
 - Abrazaderas Lewis – *Edgewise* (de canto).
 - Abrazaderas Lewis – Ranura vertical.
 - Abrazaderas Lang – Torsión diagonal, Angulación diagonal.
 - Abrazaderas Lang – Torsión diagonal.
 - Abrazaderas Lang – Torsión en ranura.
 - Abrazaderas *Edgewise* (de canto) – Estándar.
 - Abrazaderas *Edgewise* (de canto) – Ranura profunda.
 - Abrazaderas *Edgewise* (de canto) – Torsión sin torsión.
 - Abrazaderas *Edgewise* (de canto) – Ranura vertical
 - Abrazaderas *Edgewise* (de canto) – Torsión ranura vertical.
4. formas de presentación: según corresponda
 5. lote N°
 6. fecha de vto.
 7. producto de un solo uso
 8. conservar en su envase original en lugar seco y al abrigo de la luz y el calor
 9. ver instrucciones de uso en el interior del envase.
 10. Directora técnica: Sandra Broz – farmacéutica – MN 10898
 11. Autorizado por la ANMAT – PM-1042-67
 12. condición de venta: venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias


SANDBA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TÉCNICA


ACRYLAR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENGO



INSTRUCCIONES DE USO

1. Fabricado por: 1) American Orthodontics – 1536 N. 18th Street, Sheboygan, WI 53081 Estados Unidos.
2) American Orthodontics – 1919 N. 18th Street, Sheboygan, WI 53081 Estados Unidos.
2. Importado por Acryl-ar SRL – Av. Elcano 4593 – CABA - Argentina
3. Producto para uso dental solamente – Aditamentos para Ortodoncia, Marca: American Orthodontics.
Modelos: según proyecto de rotulo
4. Producto NO ESTERIL.
5. Forma de presentación: según corresponda
6. Conservar en su envase original en lugar seco y al abrigo de la luz y el calor.
7. Ver instrucciones de uso en el manual del usuario.
8. Ver precauciones, advertencias y contraindicaciones en instrucciones de uso.
9. Directora técnica: Sandra Broz – farmacéutica – MN 10898
10. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-1042-67.
11. Condición de venta: venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

Colocar el Bracket-Tubo- Banda:

1. Promover la profilaxia de los dientes con piedra pómez,
2. Lavar la boca con agua, para remover los residuos.
3. Efectuar el ataque del ácido en el área debidamente preparada en los puntos 1 y 2.; siempre en la superficie vestibular, durante 10 segundos.
4. Lavar nuevamente con agua.
5. Secar los dientes.
6. Mantener la lengua y encías separadas de los dientes, para evitar que ocurra la contaminación por el contacto con la saliva.
7. Abrir el embalaje estéril del producto, utilizando técnicas antisépticas.
8. Colocar la resina en la base del brackets, tubo, o interior de la banda. Posicionándolo en el centro de la corona clínica, con auxilio de una pinza.

Retirando el Bracket- Tubo- Banda:

1. Remover el adhesivo alrededor de la base del bracket , tubo o interior de la banda con una fresa, para evitar que la pieza se quiebre durante la remoción.
2. Posicionar el alicate de corte de ligadura en la margen oclusal y gingival de la base del bracket, tubo, certificando que la parte activa del alicate esta posicionada en lo más profundo posible a la base del esmalte.

SANDRA BROZ
DIRECTORA TÉCNICA

ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOTCHENCO


ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2252

Av. Elcano 4933 (C1427 EHA)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4553
ventas@acryl-ar.com

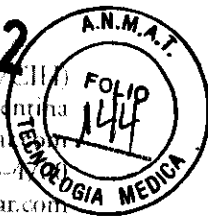

3. Con cuidado, presione el instrumento hasta que el bracket se desceamente del diente. Es importante estabilizar la dentición durante todo el proceso de remoción, utilizando la presión de los dedos, o solicitando al paciente para que muerda un rollito de algodón en el plano de mordida, evitando así, las molestias del paciente.
4. Después de la remoción de los brackets, tubos y bandas, remover también todo y cualquier adhesivo de la superficie del diente, de acuerdo con el procedimiento usual adoptado por el profesional.

Precauciones, restricciones, advertencias, almacenamiento y caducidad.

ESTERILIZACION

El producto proveído es NO ESTERIL, y no necesita de previa esterilización para su uso.

PRECAUCIONES

- Este producto deberá ser usado por los profesionales debidamente entrenados.
- La utilización de este producto no genera riesgos al paciente.
- Su aplicación debe ser realizada por un profesional del área odontológica con especialización en ortodoncia, según el tratamiento pre-establecido.
- **Producto odontológico NO ESTERIL.**
- Uso único. Descartar después del uso.

CONTRA INDICACIONES BRACKETS-TUBOS-BANDAS:

No hay contra indicaciones.

CONTRA INDICACIONES ELASTOMERICOS



Pacientes con alergia al látex no deben utilizar los elásticos de este material, en caso de irritación, suspenda el uso y consulte a su dentista. Excepto los siguientes productos Libre de Látex: Butterfly Fish e Starfish (Dimensão 1/8"), Jellyfish e Sting Ray (Dimensão 3/16"), Sand Dollar e Marlin

(Dimensão 1/4") e Angelfish e Seahorse (Dimensão 5/16")


SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TÉCNICA



ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenamiento

El producto debera ser guardado en un área fresca y seca, evitando el exceso de luz.

La sala donde los productos seran almacenados (stock) debera estar cerrado y con un sistema de ventilacion e iluminacion artificial, y su temperatura será controlada de forma que estuviere entre los 15°C a 30* C.

Los productos seran almacenados en cajas separadas por la identificacion del código, y descripción, dispuestos en estanterias, de modo de facilitar la identificacion, bien como la separacion de los productos para su expedicion.

El producto debe ser mantenido en su embalaje original hasta el momento de su utilizacion.

Transporte

El producto no ofrece riesgos a las personas para ser transportado.

Desde American Orthodontics Corp. (USA) para el distribuidor en Argentina, los productos llegan en embalajes lacrados, debidamente identificados, por avion o barco.

Desde el distribuidor para la comercializacion en Argentina, los productos seran transportados en su propio embalaje, y acondicionados en cajas de carton lacrados con cinta adhesiva.

Dentro de una misma caja de carton, podran ser transportados diversos tipos de productos con códigos distintos, por ello, cada producto(mismo código) deberan estar en embalajes lacrados, y debidamente identificados con todas las informaciones necesarias, de preferencia, de material seguro, que no se rompa, quiebre o no se abra facilmente, para ser transportado, de modo de no permitir que los productos se mezclen.

Al cliente final(ortodoncistas), debera tener la siguiente forma:

- En embalajes nuevos, cuando el pedido sea de pocas unidades, de um mismo producto, o mismo código o para pocos codigos y distintos;
- En su propio embalaje, cuando el pedido sea igual al recibido desde la fabrica;
- En cajas de carton, cuando el pedido requiera por su cantidad mayor, o sea, muchas unidades de um mismo producto, o código, o vários códigos;

SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA

ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO


ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2252

Av. Elcano 4933 (C142/C11)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4557-8000
ventas@acryl-ar.com

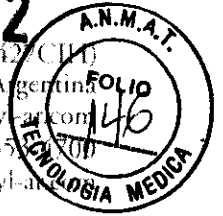

Formas de presentación

MODELOS Y APLICACIONES

Los modelos de brackets metálicos, Tubos y Bandas de American Orthodontic Corp. varían en el tamaño, torque y ángulo, de acuerdo con cada diente o grupo de dientes, y la técnica aplicada por los ortodoncistas.

Los elastoméricos varían según sus colores, tamaños y fuerzas, de acuerdo a la técnica y necesidades aplicada por los ortodoncistas.


PRESENTACION DEL PRODUCTO

Los brackets, tubos, bandas, aditamentos y elastoméricos son presentados en embalajes plásticos. No esteriles,

Vida útil

10 años.


SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA

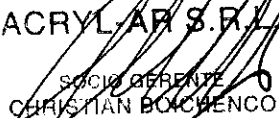
ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-18051-12-5

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N°**2252** y de acuerdo a lo solicitado por ACRYL-AR S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: ADITAMENTOS PARA ORTODONCIA.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-697- MATERIALES PARA ORTODONCIA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): AMERICAN ORTHODONTICS.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Prevenir o corregir las maloclusiones dentarias y deformidad dentofacial.

Modelo/s: Abrazaderas [Brackets]

Abrazaderas autoligables

Vision LP - Sistema Damon*

Vision LP - Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*

T3 - Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*

T3 - Sistema Roth*

T3 - Sistema Andrews*

Empower - Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*


Empower - Sistema Roth*

Empower - opciones de baja torsión

Empower - Sistema Damon* modificado - Maxilar

Empower - Sistema Damon* modificado - Mandibular

Empower – Sistema Roncone* modificado
Empower – sistema de ranura vertical Glanelly
Empower – Maxilar 1er. molar – Cementado directo
Empower – Maxilar 1er. molar – Soldable
Empower – Mandibular 1er. molar – Cementado directo
Empower – Mandibular 1er. molar – Soldable
Empower – Typodents
Empower – Tarjeta para carpeta de detalles
Abrazaderas [Brackets] metálicas
Bajo perfil – Sistema Roth de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema Alexander* de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema de arco recto modificado de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema Roth de ranura en V de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema de ranura vertical bidimensional Glanelly de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema Bioprogresivo de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema Bioprogresivo modificado de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi* de bajo perfil
Bajo perfil – Sistema de ranura en V Butterfly de bajo perfil
Bajo perfil – opciones de sistema de bajo perfil
Series Mini Master – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
Series Mini Master – Sistema Roth
Series Mini Master – Sistema de arco recto
Serie Mini Master - Sistema de arco recto modificado
Series Mini Master – Sistema Alexander*
Series Mini Master – Sistema Alexander* de estabilidad a largo plazo
Series Mini Master – Sistema de ranura vertical McLaughlin, Bennett, Trevisi*
Series Mini Master – Sistema de ranura vertical Glanelly Bio-dimensional
Series Mini Master – Sistema de ranura vertical
Series Mini Master – Sistema Bioprogresivo
Series Mini Master – Sistema Bioprogresivo modificado

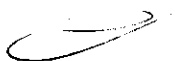




Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.I.T.

Series Mini Master – The SEBA System/prescripción Asiática
Series Mini Master – el sistema ProTorque prescripción /latino/hispano
Series Mini Master – opciones de las series – Maxilar
Series Mini Master – opciones de las series – Mandibular
Series Master – Sistema Roth*
Series Master – Sistema de arco recto
Series Master – Sistema Bioprogresivo
Series Master – Sistema Alexander*
Series Master – Sistema IBD (distancia inter-abrazadera) Sondhl*
Series Master - Sistema IBD (distancia inter-abrazadera)
Series Master – Sistema de microadhesión
Series Master – opciones de las series – Maxilar/mandibular
Mini Standard Edgewise
Mini Tweed
§. Abrazaderas cosméticas
Radiance – Sistema Roth*
Radiance – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
Radiance – Sistema Alexander LTS
Radiance – Ranura en V
Virage – Sistema Roth*
Virage – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
Virage – Sistema Bio-progresivo
Virage – el sistema SEBA – evidencia Sugiyama – basado en la prescripción asiática
20/40 – Sistema Roth*
20/40 – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
20/40 – Sistema Standard Edgewise
Sierra – Sistema Roth*
Sierra classic – Sistema Roth*
Silkon Plus - Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*

Silkon Plus – Sistema de arco recto
Forever Gold – Sistema Roth* de bajo perfil
Forever Gold – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi* de bajo perfil
Series Mini Master Forever Gold - Sistema Roth*
Series Mini Master Forever Gold – Sistema McLaughlin, Bennett, Trevisi*
Series Mini Master Forever Gold – Sistema Alexander*
Series Mini Master Forever Gold enchapado en oro 24k – Sistema Roth*
Series Mini Master Forever Gold – sistema de ranura vertical
Series Mini Master Forever Gold – tubos molares no convertibles
Series Mini Master Forever Gold – tubos molares convertibles
Stealth – Sistema lingual
Stealth Mordida plana
Abrazaderas cosméticas clásicas
Abrazaderas Empower C
Empower C – Empower Typodonts
Tubos de cementado directo
Empower SL 1ro. maxilar – autoligado
Empower SL 1ro. mandibular – autoligado
Tubo delgado 1er. o 2do. maxilar – no convertible
Tubo delgado 1er. o 2do. mandibular – no convertible
1er. molar maxilar – no convertible
1er. molar maxilar – convertible
1er. molar mandibular – no convertible
1er. molar mandibular – convertible
2do. molar maxilar – no convertible
2do. molar mandibular – no convertible
2do. molar maxilar – no convertible 2 mm
2do. molar mandibular – no convertible 2 mm
Tubos premolares para cementado directo, maxilar/mandibular
Forever Gold – tubos bucales

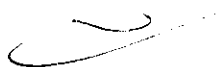



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.I.T.

Empower – tubos molares

Bandas y fijadores

MR3 – 1er. molar – superior

MR3 – 1er. molar – inferior

Maximun Retention™ – Master Series – MR1 bandas 1er. molar – superior

Maximun Retention™ – Master Series – MR1 bandas 1er. molar – inferior

Maximun Retention™ – Master Series – MRI-32 bandas 1er. molar – superior

Maximun Retention™ – Master Series – MRI-32 bandas 1er. molar – inferior

Maximun Retention™ – Master Series – MR1 bandas 2do. molar – superior

Maximun Retention™ – Master Series – MR1 bandas 2do. molar – inferior

Maximun Retention™ – Mini Master Series – MR2 1er. molar – superior

Maximun Retention™ – Mini Master Series – MR2 1er. molar – inferior

Maximun Retention™ – Mini Master Series – MR2 2do. molar – superior

Maximun Retention™ – Mini Master Series – MR2 2do. molar – inferior

§ Maximun Retention™ – Bandas para premolar superior – MR 1er. y 2do.

· Maximun Retention™ – Bandas para premolar inferior – MR 1er. premolar.

Maximun Retention™ – Bandas para premolar inferior – MR 2do. premolar.

Moldeados – Master Series – 1er. molar – templado normal – superior

Moldeados – Master Series – 1er. molar – templado normal – inferior

Moldeados – Master Series – 1er. molar serie de línea dura – superior

Moldeados – Master Series – 1er. molar serie de línea dura – inferior

Moldeados – Master Series – 2do. molar – superior

Moldeados – Master Series – 2do. molar – inferior

Moldeados – Mini master Series – 1er. molar – superior

Moldeados – Mini master Series – 1er. molar – inferior

Moldeados – Mini master Series – 2do. molar – superior

Moldeados – Mini master Series – 2do. molar – inferior

Moldeados – Micro Bands – 1er. molar – superior

Moldeados – Micro Bands – 1er. molar – inferior

Moldeados – Premolar – 1ra. y 2da. premolar – superior

Moldeados – Premolar – 1ra. y 2da. premolar – inferior

Anteriores – canino – superior

Anteriores – bandas caninos – inferior

Anteriores – bandas centrales – superior

Anteriores – bandas centrales – inferior

Anteriores – bandas laterales – superior

Anteriores – bandas laterales – inferior

Anteriores – bandas anteriores inferiores

Bandas Rollo – Lisas – superior derecho

Bandas Rollo – Lisas – superior izquierdo

Bandas Rollo – Lisas – inferior derecho

Bandas Rollo – Lisas – inferior izquierdo

Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – tuerca universal

Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – gancho + tuerca universal

Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – tuerca cilíndrica

Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – tuerca cilíndrica + 3,2 mm

Configuraciones de la banda Rollo pre-soldada – barra Cantilever

Material y almacenamiento de la banda – banda en bruto

8 Material y almacenamiento de la banda – tira

Material y almacenamiento de la banda – enrollado

Material y almacenamiento de la banda – cementado directo o Kit Box para almacenamiento de la banda

Material y almacenamiento de la banda – Kit Box para almacenamiento apilable


Material y almacenamiento de la banda – caja para almacenamiento de la banda

Posicionamiento estándar del aditamento lingual – revestimiento

Posicionamiento estándar del aditamento lingual – ojales

Posicionamiento estándar del aditamento lingual – gancho bola

Posicionamiento estándar del aditamento lingual – botones





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.I.F.

Posicionamiento estándar del aditamento lingual – abrazadera
Posicionamiento estándar del aditamento lingual – torres elásticas
Posicionamiento estándar del aditamento lingual – torres para asentamiento
Aditamentos linguales
Aparatos – Kit de retenedores adhesivos – central – central
Instrumentos – Kit de retenedores adhesivos – central – central
Instrumentos – Kit de retenedores adhesivos – lateral – lateral
Instrumentos – Kit de retenedores adhesivos – cúspide – cúspide
Instrumentos – planos de mordida – plano de mordida corto
Instrumentos – planos de mordidas – plano de mordida largo
Instrumentos – corrector lingual
Instrumentos – cierre de diastema - resorte
Instrumentos – cierre de diastema – tubo cementado directo sobre almohadilla
S. Instrumentos – cierre de diastema – juego de diastemas
Tubos y revestimientos – con muesca de enganche
Tubos y revestimientos – ranurado sin muesca de enganche
Tubos y revestimientos – ranurado con muesca de enganche
Tubos y revestimientos – ranurado con muesca de enganche y barra mesial-distal
Tubos y revestimiento – ranurado con rotación y gancho bola distal
Aditamentos – ojallillos – con forma de tira soldable
Aditamentos – ojallillos – adhesivos
Aditamentos – ojallillos – ojal en espiral adhesivo
Aditamentos – abrazadera de bajo perfil – soldable
Aditamentos – abrazadera de bajo perfil – adhesiva
Aditamentos – botones – soldables
Aditamentos – botones adhesivos
Aditamentos – tacos de base
Aditamentos – cuñas en ala de gaviota- soldable

Aditamentos – cuñas en ala de gaviota - adhesiva

Aditamentos – torres elásticas - soldable

Aditamentos – torres elásticas – adhesiva

Aditamentos – gancho auxiliar

Aditamentos – gancho bola

Maxilar 1er. molar – triple convertible – 3,5 mm Mini Master

Maxilar 1er. molar - triple convertible – 4,2 mm Master

Maxilar 1er. molar - triple convertible – 4,2 mm Cast

Maxilar 1er. molar – triple convertible – Tubos Dr. Korn

Maxilar 1er. molar – doble convertible – 3,5 mm Mini Master

Maxilar 1er. molar - doble convertible – 4,2 mm Master

Maxilar 1er. molar - doble convertible – 4,2 mm Cast

Maxilar 1er. molar – triple convertible – 3,5 mm Mini Master

Maxilar 1er. molar - triple convertible – 4,2 mm Master

Maxilar 1er. molar - triple convertible – 4,2 mm Cast

Maxilar 1er. molar – triple convertible – 3,5 mm Mini Master

Maxilar 1er. molar - triple convertible – 4,2 mm Master

Maxilar 1er. molar - triple convertible – 4,2 mm Cast

Maxilar 1er. molar – simple convertible – 3,5 mm Empower SL

Maxilar 1er. molar – simple convertible – 3,5 mm Vision LP SL

Maxilar 1er. molar – simple convertible – 3,5 mm Bajo perfil

Maxilar 1er. molar – simple convertible – 3,5 mm Mini Master

Maxilar 1er. molar – simple convertible – 4,2 mm Cast

Mandibular 1er. molar – doble convertible – 3,5 mm Mini Master

Mandibular 1er. molar - doble convertible – 4,2 mm Master

Mandibular 1er. molar - doble convertible – 4,2 mm Cast

Mandibular 1er. molar – triple convertible – Lip Jumper tube - 3,5 mm Mini Master

Mandibular 1er. molar – simple convertible – 3,5 mm Empower SL

Mandibular 1er. molar – simple convertible – 3,5 mm Vision LP SL





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.I.

Mandibular 1er. molar – simple convertible – 3,5 mm Mini Master
Mandibular 1er. molar – simple convertible – 4,2 mm Master
Mandibular 1er. molar – simple convertible – 4,2 mm Cast
Maxilar 1er. molar – triple no convertible – 4,2 mm Cast
Maxilar 1er. molar – doble no convertible – 4,5 mm bajo perfil
Maxilar 1er. molar – doble no convertible – 4,2 mm Cast
Maxilar 1er. molar – simple no convertible – 4,5 Bajo perfil
Maxilar 1er. molar – simple no convertible – 4,2 mm Cast
Mandibular 1er. molar- triple no convertible – Lip Jumper tube – 4,2 mm Cast
Mandibular 1er. molar – doble no convertible – 4,5 mm bajo perfil
Mandibular 1er. molar – doble no convertible – 4,2 mm Cast
Mandibular 1er. molar – doble no convertible – Lip Jumper tube – 4,2 mm
Cast
Mandibular 1er. molar – simple no convertible – 4,5 mm Bajo perfil
Mandibular 1er. molar – simple no convertible – 4,2 mm Cast
Maxilar 2do. molar – simple no convertible – 3,2 mm bajo perfil
Maxilar 2do. molar – simple no convertible – 3,2 mm Cast
Mandibular 2do. molar – simple no convertible – 3,2 mm bajo perfil
Mandibular 2do. molar – simple no convertible – 3,2 mm Cast
Tubos Inconel soldables – tubos redondos y rectangulares
Tubos Inconel soldables – tubos combinados
Tubos Inconel soldables – tubos de combinación doble rectangular
Tubos Inconel maxilares
Tubos Inconel mandibulares
Hickam Maxilar/Tubos Inconel mandibular
Tubos para arcos blandos- simple bajo perfil
Tubos para arcos blandos- 0° redondo de rotación simple
Tubos para arcos blandos- 6° rotación soldable 0.036 redondo y rectangular
Tubos para arcos blandos- 0° rotación soldable 0.036 combinación redondo
Tubos para arcos blandos- 0° rotación soldable doble combinación

Fundas linguales – Funda con muesca para enganche

Fundas linguales – Funda acanalada sin muesca para enganche

Fundas linguales – Funda acanalada con muesca para enganche y barra mesiodistal

Fundas linguales – Funda acanalada con rotación y gancho con esfera distal

Alambre.

Arco de alambre TriTanium – Forma I

Arco de alambre TriTanium – Forma III

Alambre "EverWhite", con memoria, de titanio – Forma I

Alambre "EverWhite", con memoria, de titanio – Forma III.

Therma-TI™ Lite – Forma I

Therma-TI™ Lite – Forma II.

Therma-TI™ - Forma I.

Therma-TI™ - Forma III.

Therma-TI™ "D" – Forma I.

Therma-TI™ "D" – Forma III.

Therma-TI™ "D" – VLP sin doblez en la línea media.

Therma-TI™ "D" – VLP con doblez en la línea media.

Therma-TI™ "D" – VLP topes precargados.

Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Forma I.

Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Forma I, con doblez en la línea media.

Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Forma I, revestido en oro.


Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Forma II.

Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Forma III.

Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Forma III, con doblez en la línea media

Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Bonwill Hawley.

Superelastic – Alambre con memoria de titanio – Curva en reversa





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Curva en reversa, tramo recto

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - VLP sin con doblez en la línea media

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - VLP con doblez en la línea media.

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - VLP topes precargados

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Arco retorcido - Forma 1 - 34 mm

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Arco retorcido - Forma 1 - 38 mm

Superelastic - Alambre con memoria de titanio - Arco retorcido - Forma 1 - 28 mm

§ Superelastic Options - Longitud recta.

Superelastic Options - Bobinas.

Force Two - Alambre con memoria de titanio - Forma I

Alambre Beta Titanium - Forma I.

Alambre Beta Titanium - Forma III

Alambre Beta Titanium - VLP Universal.

Alambre de acero inoxidable - Forma I.

Alambre de acero inoxidable - Forma I revestido en oro.

Alambre de acero inoxidable - Forma II

Alambre de acero inoxidable - Forma III.

Alambre de acero inoxidable - Bonwill-Hawley

Alambre de acero inoxidable - Bonwill-Hawley Gold Tone.

Alambre de acero inoxidable - VLP de acero inoxidable con espigo

Alambre de acero inoxidable - VLP de acero inoxidable sin espigo, sin doblez en la línea media.

Alambre de acero inoxidable - Forma ahusada.

Alambre de acero inoxidable - Tono oro.

Opciones de Alambre de acero inoxidable – Arcos ahusados, Forma I.

Opciones de Alambre de acero inoxidable – Recto, longitud 14”, redondo – Estándar

Opciones de Alambre de acero inoxidable – Recto, longitud 14”, redondo – Tono oro

Opciones de Alambre de acero inoxidable – Recto, longitud 14”, rectangular – Estándar

Opciones de Alambre de acero inoxidable – Recto, longitud 14”, rectangular – Tono oro

Alambre de acero inoxidable multifilamento – Streight™ - Trama rectangular superior/inferior – Forma I

Alambre de acero inoxidable multifilamento – Redondo retorcido – Superior/inferior – Forma I.

Alambre de acero inoxidable multifilamento – Redondo retorcido – Superior/inferior – Bonwill-Hawley.

Alambre de acero inoxidable multifilamento – Redondo retorcido – Superior/inferior – Recto.

Alambre de acero inoxidable multifilamento – Rectangular retorcido – Superior/inferior – Bonwill-Hawley.

Alambre de acero inoxidable multifilamento – Co-axial redondo, superior/inferior - Forma I.

Alambre de acero inoxidable multifilamento – Co-axial redondo, superior/inferior - Recto.

Alambre de acero inoxidable multifilamento – Co-axial redondo, superior/inferior - Bobina

Alambre de cromo-cobalto azul multifásico – Bonwill Hawley.

Alambre de cromo-cobalto azul multifásico – Tramos rectos.

Alambre de cromo-cobalto azul multifásico – Alambre de retención.

Resortes NiTi – Resortes de fuerza ajustable, espiral abierto – Rollos de 15'





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.I.

Resortes NiTi – Resortes de fuerza ajustable, espiral abierto – Tramos rectos 7"

Resortes NiTi – Resortes de fuerza ajustable, espiral cerrado con ojal.

Resortes de acero inoxidable – espiral cerrado embobinado.

Resortes de acero inoxidable – espiral abierto embobinado.

Resortes de acero inoxidable – espiral cerrado recto.

Componentes de acero inoxidable – alambre para retenedores.

Componentes de acero inoxidable – agarraderas esféricas para retenedores.

Componentes de acero inoxidable – juegos de agarraderas esféricas para retenedores.

Componentes de acero inoxidable – forma de retenedor Hawley envolvente.

Alambre de ligadura – Gancho Kobayashi

Alambre para ligadura – Gancho Kobayashi estándar

Alambre para ligadura – Gancho Kobayashi retorcido

§. Alambre para ligadura – Gancho Kobayashi retorcido, color marfil.

Alambre para ligadura – Preformado.

Alambre de ligadura – Retorcido

Alambre de ligadura – Retorcido dorado

Alambre de ligadura – Rollo de 1 lb

Alambre de ligadura – Rollo de 5 lb

Ligadura metálica – Ligadura metálica a granel

Auxiliares y otros productos metálicos – MonkeyHook®

Auxiliares y otros productos metálicos – Arco con torsión flexible auxiliar

Auxiliares y otros productos metálicos – Perno de alimentación.

Resorte separador con cierre automático – Mediano.

Resorte separador con cierre automático – Largo.

Auxiliares y otros productos de alambre – Resorte de rotación – Derecho.

Auxiliares y otros productos de alambre – Resorte de rotación – Izquierdo.

Resorte recto con retención de protección – 4 espirales – Derecho.

Resorte recto con retención de protección – 4 espirales – Izquierdo.

Auxiliares y otros productos de alambre – Kilroy Spring 1 – Lingual

Auxiliares y otros productos de alambre – Kilroy Spring 1 – Bucal

Auxiliares y otros productos de alambre – Resorte de cumplimiento - Derecho

Auxiliares y otros productos de alambre – Resorte de cumplimiento -
Izquierdo

Soporte para alambres – Soporte natural para arcos.

Soporte para alambres – Soporte para arcos Bonwill Hawley.

Soporte para alambres – Bastidor de arco metálico individual.

Elastoméricos

The Wildlife Series™ - Elásticos de látex

The Wildlife Series™ - Extra fuertes y tamaños máximos

The Wildlife Series™ - Elásticos de látex neón.

The Wildlife Series™ - Opción paquete más pequeño.

The Wildlife Series™ - Dispensador de cajas de elásticos preempaquetados.

The Wildlife Series™ - Elásticos a granel en bolsas.

The Wildlife Series™ - Elásticos sin látex

Ligaduras de color – 6 Sticks™

Ligaduras de color – Unisticks™

Ligaduras de color – 10 Ring™ |

Ligaduras de color – Juego de 6 Sticks™ surtidas

Ligaduras de color – Caja de almacenamiento 6 Sticks™

Ligaduras de color – Unisticks™ - bolsa con colores surtidos

Ligaduras de color – Unisticks™ - bolsa con colores pastel surtidos.

Ligaduras de color – Unisticks™ - juego de colores claros surtidos.

Ligaduras de color – Unisticks™ - juego de colores oscuros surtidos.

Ligaduras de color – Ligaduras de plástico a granel.

Cadena plástica de color – Cerrada.

Cadena plástica de color – Corta

Cadena plástica de color – Larga

Cadena plástica de color – Colorímetro (Color Wheel™)





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.I.

Cadena de memoria.

Color Wheel™ (Colorímetro) para ligaduras y cadenas.

Separadores – X-Ring.

Separadores – Azul radio opacos.

Separadores – Blancos

Cuñas de rotación transparentes.

Tubos E-Z Tie™

Hilo plástico

Protector de arcos.

Fijos y funcionales:

MiniScope Telescoping Herbst®

Juego MiniScope con Rollo Band.

Hanks Telescoping Herbst® (HTH).

HTH con Juego Rollo .Band.

Configuraciones Rollo Band especiales.

Aparato Herbst® - Juego Herbst®

Componentes para reposición de aparatos Herbst®

Coronas Mini Skirt.

Corona Mini Skirt – Juego.

Coronas Mini Skirt con tuerca abarrilada.

Coronas Mini Skirt con tuerca abarrilada. Juego.

Configuraciones de las coronas Mini Skirt – Tuerca universal + gancho

Configuraciones de las coronas Mini Skirt – Tuerca abarrilada + tubo 3,2 mm
0,018

Configuraciones de las coronas Mini Skirt – Tuerca abarrilada + tubo 3,2 mm
0,022

Familia Jet – Juego de Distal Jet

Familia Jet – Modelo de consulta Distal Jet.

Familia Jet – Juego Mesial Jet.

Familia Jet – Modelo de consulta dual – Mesial Jet / Uprighter Jet.

Familia Jet – Juego Uprighter Jet.

Familia Jet – Juego de resortes Jet.

Familia Jet – Modelo de consulta, Spring Jet 1 (expansión dentaria).

Familia Jet – Modelo de consulta, Spring Jet 2 (expansión ortopédica).

Familia Jet – Piezas para reposición individual.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper – Juego Jasper Jumper.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper – Jasper Jumper, tamaños individuales.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper. Modelo de consulta Jasper Jumper.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Juego Gentle Jumper

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper – Gentle Jumper, tamaños individuales.

Jasper Jumper (Propulsor mandibular) / Gentle Jumper – Juego de alambres seccionales.

Jones Jig – Juego Jones Jig de 0,018 – Tubo extraoral oclusal.

Jones Jig – Juego Jones Jig de 0,018 – Tubo extraoral gingival.

Jones Jig – Juego Jones Jig de 0,022 – Tubo extraoral oclusal.

Jones Jig – Juego Jones Jig de 0,022 – Tubo extraoral gingival.

Jones Jig – Reposición de componentes.

Jones Jig – Modelo de consulta.

Juego Rapid Molar Intruder™

Rapid Molar Intruder™ - Reposición de componentes.

Arcos palatinos – Arco palatino Goshgarian.

Arcos palatinos – Juego de Arcos palatinos Goshgarian.

Arco palatino con ojal en reversa.

Arcos palatinos – Juego de arcos palatinos con ojal en reversa.

Quad Helix – Recto

Quad Helix – Curvo





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

Correctores y paralabios Clase III – Juego Quick Fix.

Correctores y paralabios Clase III – Quick Fix. Reposición de componentes Correctores y paralabios Clase III – Protector YC3™

Correctores y paralabios Clase III – Paralabios con gancho para canino

Correctores y paralabios Clase III – Paralabios sin gancho para canino

Correctores y paralabios Clase III – Juego de paralabios – surtidos.

Correctores y paralabios Clase III – Paralabios con gancho - surtido

Correctores y paralabios Clase III – Paralabios Alexander con gancho

Correctores y paralabios Clase III – Paralabios Alexander sin gancho

Tornillos de expansión intraoral – Tornillo de expansión estándar.

Tornillos de expansión intraoral – Tornillo de expansión media.

Tornillos de expansión intraoral – Microtornillo de expansión

Tornillos de expansión intraoral – Minitornillo de expansión higiénica rápida.

Tornillos de expansión intraoral – Llave para tornillos de expansión.

§ Retenedores y aparatos – Juego de retenedores adhesivos – Central a central.

* Retenedores y aparatos – Juego de retenedores adhesivos – Lateral a lateral.

Retenedores y aparatos – Juego de retenedores adhesivos – Canino a canino.

Retenedores y aparatos – Mantenedor de espacio adhesivo.

Retenedores y aparatos – Corrector lingual adhesivo.

Retenedores y aparatos – Cierre de diastema.

Retenedores y aparatos – Juego de cierres de diastema.

Retenedores y aparatos – Planos de mordida.

Ortodoncia postural – Juego de paralabios.

Ortodoncia postural – Reposición de componentes de paralabios.

Ortodoncia postural – Juego avanzado mandibular / Tamaño 1.

Ortodoncia postural – Juego avanzado mandibular / Tamaño 2.

Ortodoncia postural – Posturador miniactivador (M.A.P., por su sigla en inglés).

Ortodoncia postural – Aparato interoclusal (I.O.A, por su sigla en inglés).

Topes y ganchos



Gancho para arcos, quirúrgico y rectangular – Ganchos quirúrgicos.

Gancho para arcos, quirúrgico y rectangular – Ganchos para arcos.

Gancho para arcos, quirúrgico y rectangular – Alicates para doblar ganchos deslizantes.

Topes y ganchos redondos y rectangulares – Pinzables

Topes y ganchos redondos y rectangulares – Soldables.

Gancho en forma de "S" (Monkey Hook)

Juego de cierre de arco sin ganchos.

Juego de cierre de arco con gancho.

Cierre de arco, reposición de componentes.

Instrumentos:

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúter de extremo distal.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúter de extremo distal – Mango largo.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúter de extremo distal – Cabeza delgada.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúter de extremo distal – Cabeza larga y delgada.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúteres de pernos y ligaduras.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúteres de minipernos y ligaduras.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúteres de micropernos y ligaduras.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Cúteres de alambre duro.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre y formar lazos de omega NiTi.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre - Pico pajarito.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre – Pico pajarito, punta cónica.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre – alambre blando.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.M.S.T.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre - Arco rect. Estilo tweed.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre - Tres puntas.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para doblar alambre - NiTi con tres puntas.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates utilitarios - Alicates Weingart .

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates utilitarios - Alicates Weingart - Mango largo.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates utilitarios - Alicates Weingart - Puntas delgadas.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Abrazaderas (Brackets) de metal pegados directamente

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Para despegar abrazaderas "Radiance"

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Para despegar abrazaderas de cerámica.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Para quitar bandas posteriores.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Alicates para quitar linguales.

Instrumentos de alta precisión Omega™ - Alicates para despegar abrazaderas - Alicates para quitar adhesivos.

Masterline Instruments™ - Cortadores - Cortador distal con sujetador de seguridad.

Masterline Instruments™ - Cortadores - Cortador distal con sujetador de seguridad, Mango largo

Masterline Instruments™ - Cortadores - Cortador distal con sujetador de seguridad para alambre pequeño.

Masterline Instruments™ - Cortadores – Cortador de extremo distal.

Masterline Instruments™ - Cortadores – Cortador estándar de ligaduras y pernos

Masterline Instruments™ - Cortadores – Cortador de minipernos y ligaduras

Masterline Instruments™ - Cortadores – Cortador de alambre duro.

Masterline Instruments™ - Cortadores – En ángulo de 15° - Cortador de alambre duro.

Masterline Instruments™ - Cortadores – En ángulo de 15° - Cortador alambre duro de cromo.

Masterline Instruments™ - Cortadores – En ángulo de 15° - Cortador alambre duro, negro anodizado.

Masterline Instruments™ - Cortadores – Cortador de Ligaduras de 45°

Masterline Instruments™ - Cortadores – Instrumento para cortar bandas

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para alambre blando.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para alambre blando Súper Scoop – Estilo Begg.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambres – Alambres para formar bucles – Estilo Tweed.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para formar bucles omega – Estilo Tweed.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates pico de pájaro

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para dobleces en V.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para formar arcos linguales

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre – Alicates para formar arcos rectangulares.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre - Alicates de tres puntas recto.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre - Alicates Jarabak

Masterline Instruments™ Alicates para doblar alambre - Alicates utilitarios rectos estilo How.

Masterline Instruments™ -Alicates para doblar alambre - Alicates utilitarios para compensar, estilo How.

Masterline Instruments™ Alicates para doblar alambre - Alicates asentador de bandas.

Masterline Instruments™ -Alicates para doblar alambre - Alicates utilitarios Weingart de 45°

Masterline Instruments™ -Alicates para doblar alambre - Alicates Weingart.

Masterline Instruments™ - Alicates Weingart - Mango largo.

Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre - Alicates para bucle Nance.

§. Masterline Instruments™ - Alicates para doblar alambre - Alicates estilo óptico.

Alicates para doblar alambre - Alicates para realizar lazos Nance uniformes.

Alicates para doblar alambre - Alicates para contornear bandas.

Alicates para doblar alambre - Alicates para tajar huecos.

Alicates para doblar alambre - Alicates para contornear de la Rosa - 0,016/0,018

Alicates para doblar alambre - Alicates para contornear de la Rosa - 0,018/0,022

Alicates para doblar alambre - Alicates para contornear de la Rosa - Llaves de reemplazo 0,016/0,018

Alicates para doblar alambre - Alicates para contornear de la Rosa - Llaves de reemplazo 0,018/0,022

Masterline Instruments™ - Alicates para remover abrazaderas (brackets) de cementado directo (AD) - Estrecho.

Masterline Instruments™ - Alicate para remover abrazaderas (brackets) de cementado directo - Ancho.

Masterline Instruments™ - Punta de reposición de alicate para remover abrazaderas de cementado directo - Estrecha.

Masterline Instruments™ -- Punta de reposición de alicate para remover abrazaderas de cementado directo - Ancha.

Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Extractor de abrazaderas de AD con almohadilla - Estrecho.

Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Extractor de abrazaderas de AD con almohadilla - Ancho.

Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Punta de reemplazo para AD con almohadilla - Estrecha.

Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Punta de reemplazo para AD con almohadilla - Ancha.

Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Extractor de abrazaderas de cementado directo.

Masterline Instruments™ - Extractor de abrazaderas (brackets) - Alicates para extracción lingual.

Instrumentos para ligaduras - Director de ligaduras.

Instrumentos para ligaduras - Director y extractor de ligaduras Speedo.

Instrumentos para ligaduras - Explorador con un extremo

Instrumentos para ligaduras - Director de ligaduras Speedo.

Instrumentos para ligaduras - Separador de módulos de fuerza.

Instrumentos para ligaduras - Pinzas para enlazar ligaduras tipo Coon.

Masterline Instruments™ - Extractores de bandas - Instrumento para cortar bandas

Masterline Instruments™ - Extractores de bandas - Extractor de bandas posteriores - Punta corta

Masterline Instruments™ - Extractores de bandas - Extractor de bandas posteriores - Punta larga.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.I.

Masterline Instruments™ - Extractores de bandas - Extractor de bandas posteriores - Punta extra-larga.

Masterline Instruments™ - Instrumentos para especialidades - Alicates para cortar ganchos quirúrgicos.

Masterline Instruments™ - Instrumentos para especialidades - Alicates para cortar ganchos de arcos.

Masterline Instruments™ - Instrumentos para especialidades - Pinzas para quitar encapsulados.

Masterline Instruments™ - Instrumentos para especialidades - Alicates para quitar adhesivos.

Masterline Instruments™ - Instrumentos para especialidades - Almohadillas de reemplazo esterilizables con calor.

Masterline Instruments™ - Instrumentos para especialidades - Puntas de reemplazo y llave inglesa.

δ, Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Soportes para abrazaderas cementadas.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Soportes para abrazaderas cementadas - Juego de 6.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Soportes para abrazaderas cementadas - con punta curva.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Soportes para abrazaderas cementadas - con punta para alineación.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Soportes para abrazaderas cementadas - Bajo perfil de cementado directo Hu-Friedy.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Soportes para abrazaderas cementadas - Punta fina.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Posicionador positivo.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Asentador de bandas de doble extremo.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Barras de mordida calor elevado.

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Empujador de bandas "Mallet Handled".

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Pinzas College 6"

Instrumentos para colocar abrazaderas y bandas - Pinzas para colocar apósitos Perry

Instrumentos para ligaduras - Soporte para agujas Mathieu.

Instrumentos para ligaduras - Mini-soporte para agujas Mathieu

Instrumentos para ligaduras - Soporte para agujas Mathieu - Estrecho.

Instrumentos para ligaduras - Pinzas Smaha - Rectas

Instrumentos para ligaduras - Hemostáticos.

Instrumentos para ligaduras - Hemostáticos. Punta fina.

Instrumentos y accesorios para especialidades - Distal Twister™, Pequeño.

Instrumentos y accesorios para especialidades - Distal Twister™, Grande.

Instrumentos para especialidades - Removedor de esmalte ajustable, de grano fino

Instrumentos para especialidades - Removedor de esmalte ajustable, de grano mediano.

5, Instrumentos para especialidades - Removedor de esmalte ajustable, de grano grueso

Instrumentos para especialidades - Removedor de encapsulado convertible.

Instrumentos para especialidades - Guía para colocación de abrazaderas Alexander

Instrumentos y accesorios para especialidades - Calibre posicionador Dontrix.

Instrumentos y accesorios para especialidades - Espátula.

Instrumentos y accesorios para especialidades - Extractor de adhesivo de cementado directo.

Instrumentos y accesorios para especialidades - Asentador de bandas / Raspador de cemento.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Espejo bucal de acero inoxidable.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Espejo bucal de plástico.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Cortador de alambre de alto rendimiento.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Soporte para alicates.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Bandeja para instrumental.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Calibre Boon.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Lubricante para instrumental Medic 365.

Instrumentos y accesorios para especialidades – Micrómetro.

Instrumentos autolingantes – Instrumento Empower.

Instrumentos autolingantes – Instrumentos Vision LP

Instrumentos autolingantes – Instrumentos T3.

Instrumentos Harmony™ - Abierto/cerrado.

Instrumentos Harmony™ - Explorador Hu-Friedy / Director de ligaduras.

Instrumentos Harmony™ - Raspador/empujador de bandas.

Accesorios para pacientes – Botones ortodóncicos Smile.

Cera ortodóncica con siliconas.

Abrazaderas para centrales maxilares – Angulación diagonal.

Abrazaderas para centrales maxilares – Triple acción.

Abrazaderas para centrales maxilares – Triple acción, ranura vertical.

Abrazaderas para laterales maxilares – Angulación diagonal.

Abrazaderas para laterales maxilares – Triple acción.

Abrazaderas para laterales maxilares – Triple acción, ranura vertical.

Abrazaderas para caninos maxilares – Angulación diagonal, torsión diagonal.

Abrazaderas para caninos maxilares – Triple acción.

Abrazaderas para caninos maxilares – Triple acción, ranura vertical.

Abrazaderas para premolares maxilares – Torsión diagonal.

Abrazaderas para premolares maxilares – Torsión diagonal, ranura vertical.

Abrazaderas para premolares maxilares – Edgewise (de canto).

Abrazaderas para premolares maxilares – Ranura vertical.

Abrazaderas para anteriores maxilares – Edgewise (de canto).

Abrazaderas para anteriores maxilares – Ranura vertical.

Abrazaderas para caninos mandibulares – Torsión diagonal, angulación diagonal.

Abrazaderas para caninos mandibulares – Triple acción.

Abrazaderas para caninos mandibulares – Triple acción, ranura vertical.

Abrazaderas para premolares mandibulares – Torsión diagonal.

Abrazaderas para premolares mandibulares – Torsión diagonal, ranura vertical.

Abrazaderas para premolares mandibulares – Edgewise (de canto).

Abrazaderas para premolares mandibulares – Ranura vertical.

Abrazaderas Lewis – Torsión diagonal.

Abrazaderas Lewis – Torsión en ranura.

Abrazaderas Lewis – Edgewise (de canto).

Abrazaderas Lewis – Ranura vertical.

Abrazaderas Lang – Torsión diagonal, Angulación diagonal.

Abrazaderas Lang – Torsión diagonal.

Abrazaderas Lang – Torsión en ranura.

Abrazaderas Edgewise (de canto) – Estándar.

Abrazaderas Edgewise (de canto) – Ranura profunda.

Abrazaderas Edgewise (de canto) – Torsión sin torsión.

Abrazaderas Edgewise (de canto) – Ranura vertical

Abrazaderas Edgewise (de canto) – Torsión ranura vertical.

Período de vida útil: 10 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: 1) AMERICAN ORTHODONTICS.

2) AMERICAN ORTHODONTICS.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Lugar/es de elaboración: 1) 1536 N. 18th Street Sheboygan, WI 53081
Estados Unidos.

2) 1919 N. 18th Street Sheboygan, WI 53081 Estados Unidos.

Se extiende a ACRYL-AR S.R.L. el Certificado PM-1042-67, en la Ciudad de
Buenos Aires, a **17 ABR 2013**, siendo su vigencia por cinco (5) años a
contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº

22512

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.