



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

DISPOSICIÓN Nº 2253

BUENOS AIRES, 17 ABR 2013

VISTO el Expediente Nº 1-47-18052-12-9 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones ACRYL-AR S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, Incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°
2253

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso I) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca AMERICAN ORTHODONTICS, nombre descriptivo MICRO IMPLANTES PARA ORTODONCIA y nombre técnico MATERIALES PARA ORTODONCIA, de acuerdo a lo solicitado por ACRYL-AR S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 86 a 87 y 88 a 90 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-1042-68, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscribáse en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas



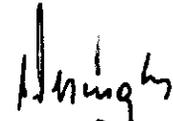
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 2253

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-18052-12-9

 DISPOSICIÓN N° **2253**


Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.I.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°**2253**.....

Nombre descriptivo: MICRO IMPLANTES PARA ORTODONCIA.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-697- MATERIALES PARA ORTODONCIA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): AMERICAN ORTHODONTICS.

Clase de Riesgo: Clase III.

Indicación/es autorizada/s: Punto de apoyo fijo para las fuerzas que el ortodoncista precisa aplicar, movimientos dentarios necesarios para el tratamiento ortodóncico, recurso de anclaje en retracción de dientes anteriores, mesialización de dientes posteriores, intrusión de incisivos, intrusión de dientes posteriores corrección del plano oclusal, distalización de molares, corrección de la mordida cruzada posterior, fraccionamiento de dientes, corrección de la línea media.

Modelo/s: Microtornillos

Microtornillos The Aarhus System™ - Tornillos con agujero.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tornillos con cabeza botón.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tornillos con cabeza bracket.

Microtornillos The Aarhus System™ - Juego inicial.

Microtornillos The Aarhus System™ - Soporte de cargador.

Microtornillos The Aarhus System™ - Bandeja de esterilización.

Microtornillos The Aarhus System™ - Mango de destornillador.

Microtornillos The Aarhus System™ - Mango de destornillador (estilo opcional).

Microtornillos The Aarhus System™ - Punta de destornillador larga.

Microtornillos The Aarhus System™ - Seguro de liberación de tornillo largo.

Microtornillos The Aarhus System™ - Punta de destornillador.

Microtornillos The Aarhus System™ - Seguro de liberador de tornillo



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Microtornillos The Aarhus System™ - Fresas 0,9 x 4 x 22 mm - bucales
Microtornillos The Aarhus System™ - Fresas 0,9 x 4 x 28 mm - palatinas
Microtornillos The Aarhus System™ - Calibre de fuerza
Microtornillos The Aarhus System™ - Tubos transversales.
Microtornillos The Aarhus System™ - Tubos concatenados
Microtornillos The Aarhus System™ - Gancho rizable con fuerza (corto)
Microtornillos The Aarhus System™ - Gancho rizable con fuerza (largo)
Microtornillos The Aarhus System™ - Gancho rizable con fuerza (triple).
Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTI (tapa de frasco), 50 g
Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTI (tapa de frasco), 125 g
Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTI (extremo en forma de
pera), 50 g
Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTI (extremo en forma de
pera), 125 g
Microtornillos The Aarhus System™ - Fresa piloto para orientación.
Microtornillos The Aarhus System™ - Tope rizable con alambre
Período de vida útil: 10 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones
sanitarias.

Nombre del fabricante: 1) AMERICAN ORTHODONTICS.
2) AMERICAN ORTHODONTICS.

Lugar/es de elaboración: 1) 1536 N. 18th Street Sheboygan, WI 53081
Estados Unidos.

2) 1919 N. 18th Street Sheboygan, WI 53081 Estados Unidos.

Expediente Nº 1-47-18052-12-9

DISPOSICIÓN Nº **2253**

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

2253

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2253

Av. Elcano 4933 (C1470) 11
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 455.1111
ventas@acryl-ar.com



PROYECTO DE ROTULO

1. Fabricado por: 1) American Orthodontics – 1536 N. 18th Street, Sheboygan, WI 53081 Estados Unidos.
2) American Orthodontics – 1919 N. 18th Street, Sheboygan, WI 53081 Estados Unidos.
2. Importado por Acryl-ar SRL – Av. Elcano 4593 – CABA – Argentina
3. Producto para uso dental solamente – Productos para Ortodoncia (microimplantes), Marca: American Orthodontics.

Modelos: Microtornillos

Microtornillos The Aarhus System™ - Tornillos con agujero.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tornillos con cabeza botón.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tornillos con cabeza bracket.

Microtornillos The Aarhus System™ - Juego inicial.

Microtornillos The Aarhus System™ - Soporte de cargador.

Microtornillos The Aarhus System™ - Bandeja de esterilización.

Microtornillos The Aarhus System™ - Mango de destornillador.

Microtornillos The Aarhus System™ - Mango de destornillador (estilo opcional)

Microtornillos The Aarhus System™ - Punta de destornillador larga.

Microtornillos The Aarhus System™ - Seguro de liberación de tornillo largo.

Microtornillos The Aarhus System™ - Punta de destornillador.

Microtornillos The Aarhus System™ - Seguro de liberador de tornillo

Microtornillos The Aarhus System™ - Fresas 0,9 x 4 x 22 mm – bucales

Microtornillos The Aarhus System™ - Fresas 0,9 x 4 x 28 mm – palatinas

Microtornillos The Aarhus System™ - Calibre de fuerza

Microtornillos The Aarhus System™ - Tubos transversales.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tubos concatenados

Microtornillos The Aarhus System™ - Gancho rizable con fuerza (corto)

Microtornillos The Aarhus System™ - Gancho rizable con fuerza (largo)

Microtornillos The Aarhus System™ - Gancho rizable con fuerza (triple).

Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTi (tapa de frasco), 50 g

Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTi (tapa de frasco), 125 g

Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTi (extremo en forma de pera), 50 g

Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTi (extremo en forma de pera), 125 g

Microtornillos The Aarhus System™ - Fresa piloto para orientación.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tope rizable con alambre

4. Formas de presentación: Los DAT se presentan en forma unitaria en bolsitas plásticas, conteniendo 5 piezas por modelo, o en Kit completo de piezas, cajá esterilizadora, mango y mandril
5. Nº de lote
6. Vto.
7. Producto de un solo uso, NO ESTÉRIL, se deberá esterilizar antes de su uso
8. Conservar en su envase original en lugar seco y al abrigo de la luz y el calor.


SANDRA BROZ
M.N. 10698
DIRECTORA TÉCNICA


ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2253

Av. Elcano 4933 (C1427CBA)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4553
ventas@acryl-ar.com



9. Ver instrucciones de uso en interior del envase
10. Ver precauciones, advertencias y contraindicaciones en instrucciones de uso.
11. Directora técnica: Sandra Broz – farmacéutica – MN 10898
12. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-1042-68.
13. Condición de venta: venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias


SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA

ACRYL-AR S.R.L.

SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO



ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2253

Av. Elcano 4933 (C1427 CHI)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4553
ventas@acryl-ar.com



INSTRUCCIONES DE USO

1. Fabricado por: 1) American Orthodontics – 1536 N. 18th Street, Sheboygan, WI 53081 Estados Unidos.
2) American Orthodontics – 1919 N. 18th Street, Sheboygan, WI 53081 Estados Unidos.
2. Importado por Acryl-ar SRL – Av. Elcano 4593 – CABA – Argentina
3. Producto para uso dental solamente – Productos para Ortodoncia (microimplantes), Marca: American Orthodontics.

Modelos: Microtornillos

Microtornillos The Aarhus System™ - Tornillos con agujero.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tornillos con cabeza botón.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tornillos con cabeza bracket.

Microtornillos The Aarhus System™ - Juego inicial.

Microtornillos The Aarhus System™ - Soporte de cargador.

Microtornillos The Aarhus System™ - Bandeja de esterilización.

Microtornillos The Aarhus System™ - Mango de destornillador.

Microtornillos The Aarhus System™ - Mango de destornillador (estilo opcional)

Microtornillos The Aarhus System™ - Punta de destornillador larga.

Microtornillos The Aarhus System™ - Seguro de liberación de tornillo largo.

Microtornillos The Aarhus System™ - Punta de destornillador.

Microtornillos The Aarhus System™ - Seguro de liberador de tornillo

Microtornillos The Aarhus System™ - Fresas 0,9 x 4 x 22 mm – bucales

Microtornillos The Aarhus System™ - Fresas 0,9 x 4 x 28 mm – palatinas

Microtornillos The Aarhus System™ - Calibre de fuerza

Microtornillos The Aarhus System™ - Tubos transversales.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tubos concatenados

Microtornillos The Aarhus System™ - Gancho rizable con fuerza (corto)

Microtornillos The Aarhus System™ - Gancho rizable con fuerza (largo)

Microtornillos The Aarhus System™ - Gancho rizable con fuerza (triple).

Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTi (tapa de frasco), 50 g

Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTi (tapa de frasco), 125 g

Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTi (extremo en forma de pera), 50 g

Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTi (extremo en forma de pera), 125 g

Microtornillos The Aarhus System™ - Fresa piloto para orientación.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tope rizable con alambre

4. Formas de presentación: Los DAT se presentan en forma unitaria en bolsitas plásticas, conteniendo 5 piezas por modelo, o en Kit completo de piezas, cajá esterilizadora, mango y mandril
5. Producto de un solo uso, NO ESTÉRIL, se deberá esterilizar antes de su uso
6. Conservar en su envase original en lugar seco y al abrigo de la luz y el calor.
7. Ver instrucciones de uso en interior del envase
8. Ver precauciones, advertencias y contraindicaciones en instrucciones de uso.

SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TÉCNICA

ACRYL-AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo

Whip Mix

2253
A. El año 1933 C. 14270 II FOLIO 89
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553
ventas@acryl-ar.com



9. Directora técnica: Sandra Broz – farmacéutica – MN 10898
10. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-1042-68.
11. Condición de venta: venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

SELECCIÓN E INSTALACIÓN:

- A- Como recurso de anclaje, debe tener un planeamiento cuidadoso e individualización para cada caso.
- B- Determinado el tratamiento a seguir, el ortodoncista deberá definir el tipo de movimiento deseado, y lugar donde realizara la colocación.
- C- Debe realizar una revisión clínica preliminar, como palpar digitalmente el lugar, identificar las raíces de los dientes.
- D- Analizar radiografías panorámicas, y peri apicales. Para investigar la disponibilidad ósea para la instalación y colocación de los DAT elección Del diámetro de los DATs.
- E- De acuerdo a muchos ortodoncistas, el éxito del tratamiento con los DATs depende de los siguientes factores: a- habilidad del profesional, b- condición física del paciente, c-selección del lugar adecuado, d- estabilidad inicial, y d- higiene bucal.

ESTERILIZACIÓN

El producto que es proveído No Estéril, debe seguir métodos de esterilización de acuerdo a técnicas conocidas y aplicadas por el ortodoncista

Debe ser esterilizado en autoclave de acuerdo a los conocimientos generales del ortodoncista.

PRECAUCIÓN

- Este producto deberá ser manipulado por el profesional debidamente entrenado.
- La utilización de este producto no genera riesgos al paciente.
- Su aplicación deberá ser únicamente hecha por profesional del área de odontología, con especialización en ortodoncia, según el tratamiento previsto para cada caso
- **Producto que necesita ESTERILIZACIÓN PREVIA PARA SU USO.**
- Uso único. Descartar después de su uso.

CONTRA INDICACIONES

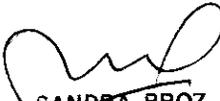
NO EXISTEN CONTRA INDICACIONES

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenamiento

El producto deberá ser guardado en un área fresca y seca, evitando el exceso de luz.

La sala donde los productos serán almacenados (stock) deberá estar cerrado y con un sistema de ventilación e iluminación artificial, y su temperatura será controlada de forma que estuviere entre los 15°C a 30°C.


SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA

ACRYL-AR S.R.L.


RODRIGO BENEDETTI
CHRISTIAN BOICHENCO

ACRYL-AR

Representante
Exclusivo



2253
Av. Elcano 4955 (C14, 70111)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4111
ventas@acryl-ar.com



Los productos serán almacenados en cajas separadas por la identificación del código, y descripción, dispuestos en estanterías, de modo de facilitar la identificación, bien como la separación de los productos para su expedición.

El producto debe ser mantenido en su embalaje original hasta el momento de su utilización.

Transporte

El producto no ofrece riesgos a las personas para ser transportado.

Desde American Orthodontics Corp. (USA) para el distribuidor en Argentina, los productos llegan en embalajes lacrados, debidamente identificados, por avión o barco.

Desde el distribuidor para la comercialización en Argentina, los productos serán transportados en su propio embalaje, y acondicionados en cajas de cartón lacrados con cinta adhesiva.

Dentro de una misma caja de cartón, podrán ser transportados diversos tipos de productos con códigos distintos, por ello, cada producto(mismo código) deberán estar en embalajes lacrados, y debidamente identificados con todas las informaciones necesarias, de preferencia, de material seguro, que no se rompa, quiebre o no se abra fácilmente, para ser transportado, de modo de no permitir que los productos se mezclen.

Al cliente final (ortodoncistas), deberá tener la siguiente forma:

- En embalajes nuevos, cuando el pedido sea de pocas unidades, de un mismo producto, o mismo código o para pocos códigos y distintos;
- En su propio embalaje, cuando el pedido sea igual al recibido desde la fabrica;
- En cajas de cartón, cuando el pedido requiera por su cantidad mayor, o sea, muchas unidades de un mismo producto, o código, o varios códigos;

Formas de presentación: Los DAT se presentan en forma unitaria en bolsitas plásticas, conteniendo 5 piezas por modelo, o en Kit completo de piezas, cajá esterilizadora, mango y mandril

Vida útil: 10 años


SANDRA BOZ
M.N. 10898
DIRECTORA TÉCNICA

ACRYL-AR S.R.L.

SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.I.

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-18052-12-9

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **2.253**, y de acuerdo a lo solicitado por ACRYL-AR S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: MICRO IMPLANTES PARA ORTODONCIA.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-697- MATERIALES PARA ORTODONCIA.

§ Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): AMERICAN ORTHODONTICS.

Clase de Riesgo: Clase III.

Indicación/es autorizada/s: Punto de apoyo fijo para las fuerzas que el ortodoncista precisa aplicar, movimientos dentarios necesarios para el tratamiento ortodóncico, recurso de anclaje en retracción de dientes anteriores, mesialización de dientes posteriores, intrusión de incisivos, intrusión de dientes posteriores corrección del plano oclusal, distalización de molares, corrección de la mordida cruzada posterior, fraccionamiento de dientes, corrección de la línea media.

Modelo/s: Microtornillos

Microtornillos The Aarhus System™ - Tornillos con agujero.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tornillos con cabeza botón.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tornillos con cabeza bracket.

Microtornillos The Aarhus System™ - Juego inicial.

Microtornillos The Aarhus System™ - Soporte de cargador.

Microtornillos The Aarhus System™ - Bandeja de esterilización.

Microtornillos The Aarhus System™ - Mango de destornillador.

Microtornillos The Aarhus System™ - Mango de destornillador (estilo opcional).

Microtornillos The Aarhus System™ - Punta de destornillador larga.

Microtornillos The Aarhus System™ - Seguro de liberación de tornillo largo.

Microtornillos The Aarhus System™ - Punta de destornillador.

Microtornillos The Aarhus System™ - Seguro de liberador de tornillo

Microtornillos The Aarhus System™ - Fresas 0,9 x 4 x 22 mm – bucales

Microtornillos The Aarhus System™ - Fresas 0,9 x 4 x 28 mm – palatinas

Microtornillos The Aarhus System™ - Calibre de fuerza

Microtornillos The Aarhus System™ - Tubos transversales.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tubos concatenados

Microtornillos The Aarhus System™ - Gancho rizable con fuerza (corto)

Microtornillos The Aarhus System™ - Gancho rizable con fuerza (largo)

Microtornillos The Aarhus System™ - Gancho rizable con fuerza (triple).

Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTi (tapa de frasco), 50 g

Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTi (tapa de frasco), 125 g

Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTi (extremo en forma de pera), 50 g

Microtornillos The Aarhus System™ - Resortes NiTi (extremo en forma de pera), 125 g

Microtornillos The Aarhus System™ - Fresa piloto para orientación.

Microtornillos The Aarhus System™ - Tope rizable con alambre

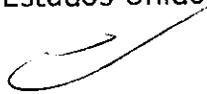
Período de vida útil: 10 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: 1) AMERICAN ORTHODONTICS.

2) AMERICAN ORTHODONTICS.

Lugar/es de elaboración: 1) 1536 N. 18th Street Sheboygan, WI 53081 Estados Unidos.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2) 1919 N. 18th Street Sheboygan, WI 53081 Estados Unidos.

Se extiende a ACRYL-AR S.R.L. el Certificado PM-1042-68, en la Ciudad de Buenos Aires, a 17 ABR 2013, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº **2253**

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.