



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

"2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

DISPOSICIÓN N° 5823

BUENOS AIRES, 26 AGO 2011

VISTO el Expediente N° 1-47-3168-11-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones y MUNTAL S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas,*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T*

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca DFL, nombre descriptivo: resinas compuestas y nombre técnico Materiales restauradores dentales, de acuerdo a lo solicitado, por MUNTAL S.A, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 11 y 12 Y 15 a 24 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-420-76, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.P.*

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3168-11-5

DISPOSICIÓN N° **5823**

ro

Dr. OTTO A. ORSINGHER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.P.



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° ..... **5823** .....

Nombre descriptivo: Resinas Compuestas

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-188 Materiales restauradores

Marca del producto médico: DFL

Modelos: Natural Look – Natural Flow

Período de vida útil: Natural Look ; 2 años desde fabricación.

Natural Flow ; 3 años desde fabricación.

Clase de Riesgo: II

Indicación/es autorizada/s: Estan indicados para restauraciones dentales.

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: DFL INDUSTRIA E COMERCIO SA

Lugar/es de elaboración: Estrada Do Guerengue n° 2059, Jacarepagua 22713-002, Rio de Janeiro, Brasil

Expediente N° 1-47-3168-11-5

DISPOSICIÓN N° **5823**

ro

*W.A.M.*  
Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del  
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

**5823**

.....

Dr. OTTO A. ORSINGHER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

ANEXO III  
CERTIFICADO

Expediente N° 1-47-3168-11-5

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **5823**, y de acuerdo a lo solicitado por MUNTAL S.A, se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Resinas Compuestas

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-188 Materiales restauradores

Marca del producto médico: DFL

Modelos: Natural Look – Natural Flow

Período de vida útil: Natural Look ; 2 años desde fabricación.

Natural Flow ; 3 años desde fabricación.

Clase de Riesgo: II

Indicación/es autorizada/s: Estan indicados para restauraciones dentales.

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: DFL INDUSTRIA E COMERCIO SA

Lugar/es de elaboración: Estrada Do Guerengue n° 2059, Jacarepagua 22713-002, Rio de Janeiro, Brasil.

Se extiende a MUNTAL S.A. el Certificado PM-420-76, en la Ciudad de Buenos Aires, a **26 AGO 2011**, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N° **5823**

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.

## PROYECTO DE ROTULO

---

*Fabricado por:*

**DFL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.**

Estrada Do Guerengue nº 2059 , Jacarepagua

22.713-002

Río de Janeiro

Brasil

*Importado por:*

**MUNTAL S.A.**

Espinosa 2436/8,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Rep. Argentina

Tel: (011) 4584-7887

Fax: (011) 4584-8600

## NATURAL LOOK

Descripción: Resina Restauradora Microhíbrida Fotoactivada

Código: **XXXX**

Lote N° **XXXXX**

Fecha de fabricación: **xx/yy**

Validez: **3 años.**

Contenido: 1 jeringa con 4 gramos.

### SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL

Se debe conservar en envases herméticos, en temperaturas entre 2° C y 30° C.

No someter a temperaturas elevadas.

Lea las instrucciones de Uso.

Director Técnico: Norberto Juan Lomoro

Farmacéutico, M.N. 10.876

“AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T PM 420-76”

MUNTAL S.A.  
  
HECTOR M. JUSID  
PRESIDENTE

  
NORBERTO J. LOMORO  
FARMACÉUTICO  
A. N. N.º 10876 - M. P. N.º 14035  
DIRECTOR TÉCNICO



5823



## **PROYECTO DE ROTULO**

---

*Fabricado por:*

**DFL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.**  
Estrada Do Guerengue nº 2059 , Jacarepagua  
22.713-002  
Rio de Janeiro  
Brasil

*Importado por:*

**MUNTAL S.A.**  
Espinosa 2436/8,  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Rep. Argentina  
Tel: (011) 4584-7887  
Fax: (011) 4584-8600

## **NATURAL FLOW**

Descripción: Resina Compuesta Fotoactivada / Baja Viscosidad

Código: **XXXX**      Lote Nº **XXXXX**      Fecha de Fabricación: **xx/yy**

Validez: **2 años**

Contenido: 1 jeringa con 1.2 gramos.

**SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL**

Se debe conservar en envases herméticos, en temperaturas entre 2° C y 30° C.  
No someter a temperaturas elevadas.

Lea las instrucciones de Uso.

Director Técnico: Norberto Juan Lomoro  
Farmacéutico, M.N. 10.876

  
**NORBERTO J. LOMORO**  
FARMACEUTICO  
M. N. Nº 10876    M. P. Nº 14000  
DIRECTOR TECNICO

**"AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T PM 420-76"**

**MUNTAL S.A.**  
  
**HECTOR M. JUSIO**  
PRESIDENTE

---

## **PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO**

---

*Fabricado por:*

**DFL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.**

Estrada Do Guerengue nº 2059 , Jacarepagua

22.713-002

Rio de Janeiro

Brasil

*Importado por:*

**MUNTAL S.A.**

Espinosa 2436/8,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Rep. Argentina

Tel: (011) 4584-7887

Fax: (011) 4584-8600

### **NATURAL LOOK**

Resina compuesta fotopolimerizable

Director Técnico: Norberto Juan Lomoro

Farmacéutico, M.N. 10.876

“AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM 420-76”

### **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

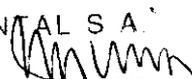
El NATURAL LOOK es un compuesto híbrido fino con excelente resistencia, fotoactivado y opaco en la radiografía. NATURAL LOOK es fabricado bajo riguroso control de calidad, lo que proporciona al profesional calidad superior en los resultados estéticos y funcionales.

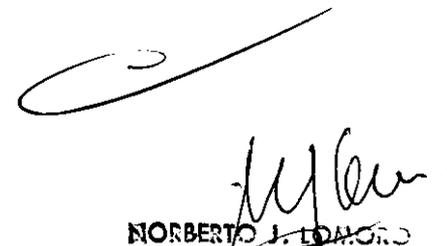
### **INDICACIONES DE USO**

NATURAL LOOK está indicado para :

- Reconstrucciones: Clases I y II
- Clases III, IV y V

MUNTAL S.A.

  
HECTOR M. JUSID  
PRESIDENTE

  
NORBERTO J. LOMORO  
FARMACEUTICO

M. N. N° 10876 - M. P. N° 14000  
DIRECTOR TECNICO



- Facetas directas.
- Cierre de diastemas.
- Esplintaje periodontal con fibras.

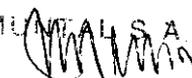
### **CONTRAINDICACIONES**

Evitar el uso en pacientes con historia de alergias a resinas compuestas polimerizables.

No utilizar el producto en pacientes que muestren alguna forma de alergia al material. En caso de alergia, suspenda inmediatamente el uso y aconseje al paciente que consulte con su médico.

### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

- NATURAL LOOK está destinado sólo para uso profesional y para las aplicaciones descritas.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto directo con los ojos. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar asistencia médica.
- Evitar el contacto del producto con los tejidos orales o con la piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua.
- Se debe advertir al paciente sobre el riesgo que ocurra sensibilización en el lugar del procedimiento. Este efecto se puede minimizar con aislamiento (dique de goma) y protección pulpar adecuados.
- Evite el contacto con productos derivados del eugenol, ya que este frena la acción de los ionómeros de vidrio.
- Mantenga herméticamente cerrados los recipientes cuando no se estén usando.
- El envase y el producto médico deben ser inspeccionados antes de su uso.
- No lo utilice si el envase se encuentra abierto o dañado.
- No utilizar si el producto se encuentra vencido.
- No esterilizar este producto. No reutilizar.

MUNTA S.A.  
  
HECTOR M. JUSID  
PRESIDENTE

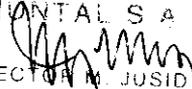
  
NORBERTO J. ROMERO  
FARMACÉUTICO  
M. N. N° 10876 - M. P. N° 14025  
DIRECTOR TÉCNICO



- Cerrar muy bien el envase una vez utilizado.
- Utilice buenas prácticas de trabajo.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Quitar la restauración o el tejido con caries. Se recomienda biselar los bordes del esmalte.
2. Se limpia el diente a tratar y sus limítrofes mesiales y distales con una pasta sin flúor.
3. La selección del color se determina con una buena luz del día o lámparas de luz diurna.
4. Se recomienda el uso de dique de goma.
5. En caso de necesidad, forrar utilizando hidróxido de calcio y/o ionómero de vidrio
6. Tratar el esmalte y la dentina durante 10 a 15 segundos con ALPHA Etch: Enjuagar con spray del agua. Retirar el exceso de humedad con un chorro de aire para evitar que la dentina se seque demasiado. La humedad debe ser visible en las superficie (dentina brillante) pero no debe haber lugares en los que permanezca depositada. En este caso se debe pasar un pincel o papel absorbente. Evitar la contaminación por saliva.
7. En caso de necesidad colocar una cinta de matriz delgada y transparente. Fijar la matriz proximal con cuñas dentales.
8. Aplicar el agente de enlace MULTI BOND UNO: Colocar 2 gotas de MULTI BOND UNO en una celdilla de mezcla. Con un pincel aplicar la primera capa, aplicar una segunda capa. Evitar el uso exagerado de aire para que las capas no sean muy finas. Fotopolimerizar por 20 segundos. La superficie debe quedar brillante, en caso contrario hay que repetir la aplicación.
9. Dosificar incrementando NATURAL LOOK directamente sobre el bloque de mezcla y luego se le recoge en cantidades pequeñas y se aplica en la cavidad en capas de hasta 3 mm.

MONTAL S A  
  
HECTOR M. JUSID  
PRESIDENTE

  
ROBERTO J. LONGO  
FARMACEUTICO  
A. N. N.º 10876 - M. P. N.º 14035  
DIRECTOR TECNICO

5823



10. Fotoactivar cada capa por 20 segundos, terminando con una polimerización de 40 segundos.

11. El acabado comprende tres etapas:

- El desbastado con fresas de diamantes de pulido.
- La terminación con los pulidores de fieltro
- El pulido final con los pulidores de fieltro.

### ALMACENAMIENTO

Se debe conservar en envases herméticos, en temperaturas entre 2° C y 30° C. No someter a temperaturas elevadas.

Advertencia: inspeccionar el producto buscando alguna señal de daño. No utilice si el envase o el producto se encuentran dañados.

MUNTAL S.A. no controla factores relacionados a la actividad del profesional.

Ante cualquier consulta le rogamos se ponga en contacto con nosotros.  
[muntal@muntal.net](mailto:muntal@muntal.net) o [muntal@cuidad.com.ar](mailto:muntal@cuidad.com.ar)

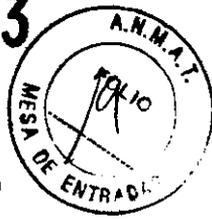
### Leer las instrucciones de Uso

MUNTAL S.A.  
HECTOR M. JUSID  
PRESIDENTE

NORBERTO J. DOMORO  
FARMACEUTICO  
A. N. N° 10876 - M. P. N° 14005  
DIRECTOR TECNICO



5823



## PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

*Fabricado por:*

**DFL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.**

Estrada Do Guerengue nº 2059 , Jacarepagua

22.713-002

Rio de Janeiro

Brasil

*Importado por:*

**MUNTAL S.A.**

Espinosa 2436/8,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Rep. Argentina

Tel: (011) 4584-7887

Fax: (011) 4584-8600

## NATURAL FLOW

Resina compuesta fotopolimerizable

Director Técnico: Norberto Juan Lomoro

Farmacéutico, M.N. 10.876

"AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM 420-76"

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El NATURAL FLOW es una resina compuesta fotopolimerizable con baja viscosidad, que proporciona una buena resistencia a la compresión, a la tensión diametral y a la flexión.

### INDICACIONES DE USO

NATURAL FLOW está indicado para restauraciones dentales en las cuales el esmalte se presenta con hipoplasias, lesiones debidas a la erosión o la abrasión, para sellar depresiones y fisuras.

  
MUNTAL S.A.  
HECTOR MUJUSID  
PRESIDENTE

  
NORBERTO J. LOMORO  
FARMACEUTICO  
A. N. N° 10876 - M. P. N° 14005  
DIRECTOR TECNICO



## CONTRAINDICACIONES

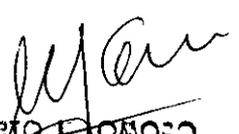
Evitar el uso en pacientes con historia de alergias a resinas compuestas polimerizables.

No utilizar el producto en pacientes que muestren alguna forma de alergia al material. En caso de alergia, suspenda inmediatamente el uso y aconseje al paciente que consulte con su médico.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- NATURAL FLOW está destinado sólo para uso profesional y para las aplicaciones descriptas.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto directo con los ojos. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar asistencia médica.
- Evitar el contacto del producto con los tejidos orales o con la piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua.
- Utilizar guantes durante el procedimiento.
- Se debe advertir al paciente sobre el riesgo que ocurra sensibilización en el lugar del procedimiento. Este efecto se puede minimizar con aislamiento (dique de goma) y protección pulpar adecuados.
- Evite el contacto con productos derivados del eugenol, ya que este frena la acción de los ionómeros de vidrio.
- Mantenga herméticamente cerrados los recipientes cuando no se estén usando.
- El envase y el producto médico deben ser inspeccionados antes de su uso.
- No lo utilice si el envase se encuentra abierto o dañado.
- No utilizar si el producto se encuentra vencido.
- No esterilizar este producto. No reutilizar.
- Cerrar muy bien el envase una vez utilizado.
- Utilice buenas prácticas de trabajo.

MUNITAL S.A.  
  
HECTOR M. JUSID  
PRESIDENTE

  
NORBERTO P. COMORO  
FARMACEUTICO  
I. N. N.º 10876 - M. P. N.º 14095  
DIRECTOR TECNICO



## INSTRUCCIONES DE USO

### *PARA RESTAURACIONES CLASE III*

Atención: La restauración debe estar fuera del contacto oclusal.

El acondicionamiento consiste apenas en retirar el tejido cariado por la cara lingual. Elija el color adecuado utilizando una escala de porcelana Vita. Aísle la región perfectamente. Ataque con ácido la superficie deseada y siga los procedimientos de adhesión convencionales. Inmediatamente aplique NATURAL FLOW con el auxilio de la punta aplicadora. Use un pincel para adaptar el material y deje fotopolimerizar por 30 segundos. Siga los procedimientos de pulido convencionales recomendados para resinas fotopolimerizables. Efectúe un nuevo ataque ácido y aplique una capa de adhesivo para esmalte sobre toda la restauración y sus márgenes.

### *PARA RESTAURACIONES CLASE V*

Retire el tejido cariado, si lo hay, y elija el color adecuado utilizando una escala de porcelana Vita. Aísle la región perfectamente. Haga un bisel solamente en el ángulo cavo superficial. Ataque con ácido la superficie deseada y siga los procedimientos de adhesión convencionales. Inmediatamente aplique NATURAL FLOW con el auxilio de la punta aplicadora. Use un pincel para adaptar el material y deje fotopolimerizar por 30 segundos. En cavidades profundas aplique una capa de NATURAL FLOW opaco y siga los procedimientos de pulido convencionales recomendados para resinas fotopolimerizables. Efectúe un nuevo ataque ácido aplique una capa de adhesivo para esmalte sobre toda la restauración y sus márgenes.

### *PARA LLENAR AREAS SOCAVADAS*

Retire el tejido cariado, si lo hay, y elija el color adecuado utilizando una escala de porcelana Vita. Aísle la región perfectamente. Antes de utilizar la resina convencional aplique NATURAL FLOW para llenar y nivelar las

MUTAL S A  
HECTOR M. JUSID  
PRESIDENTE

NORBERTO J. LONORO  
FARMACEUTICO  
M. N. N.º 10876 - M. P. N.º 14005  
DIRECTOR TECNICO



áreas socavadas y de difícil acceso. Evite que el producto alcance la región oclusal.

**PARA ESMALTE CON MANCHAS HIPOPLASTICAS, FLUOROSIS, EROSION, ABRASION O PIGMENTACION (CARILLAS)**

Elija el color adecuado utilizando una escala de porcelana Vita. Aísle la región perfectamente. Ataque con ácido la superficie deseada y siga los procedimientos de adhesión convencionales. Inmediatamente aplique NATURAL FLOW con el auxilio de la punta aplicadora. Use un pincel para adaptar el material y deje fotopolimerizar por 30 segundos. Si es necesario aplique la primera capa de NATURAL FLOW opaco y deje fotopolimerizar por 40 segundos. Aplique inmediatamente la capa del tercio cervical y deje fotopolimerizar, la del tercio medio y deje polimerizar y la del tercio incisal y deje fotopolimerizar. Siga los procedimientos de pulido convencionales recomendados para resinas fotopolimerizables. Efectúe un nuevo ataque ácido y aplique una capa de adhesivo para esmalte sobre toda la restauración y sus márgenes.

**PARA SELLADO DE DEPRESIONES Y FISURAS**

Aísle la región perfectamente y haga un ataque ácido sobre la superficie de las depresiones y fisuras. Aplique NATURAL FLOW utilizando la punta aplicadora. Evite que el producto alcance la región oclusal. Deje fotopolimerizar durante 30 segundos. Siga los procedimientos de pulido convencionales recomendados para resinas fotopolimerizables.

**PARA REPARACIONES EN RESINA COMPUESTA**

Seleccione el color adecuado de acuerdo al de la resina existente. Aísle la región perfectamente y haga un ataque ácido sobre la superficie que presenta defectos y la región adyacente. Siga los procedimientos convencionales de adhesión y aplique NATURAL FLOW utilizando una punta aplicadora. Use un pincel para colocar correctamente el material.

MUNTA S A  
HECTOR M. JUSIA  
PRESIDENTE

NORBERTO J. TOMORO  
FARMACEUTICO  
M. N. N° 10876 - M. P. N° 14005  
DIRECTOR TECNICO



Deje fotopolimerizar durante 30 segundos y siga los procedimientos de pulido convencionales recomendados para resina fotopolimerizables.

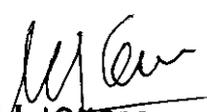
#### *PARA REPARACIONES DE PORCELANA*

Seleccione el color adecuado de acuerdo al de la cerámica existente. Aísle la región perfectamente. Haga el acondicionamiento de la membrana con ácido fluorhídrico al 10 % por 1 minuto. Enjuague durante 2 minutos y aplique Silano por 2 minutos y haga un ataque ácido al esmalte adyacente, en caso de que haya. Siga los procedimientos convencionales de adhesión para porcelana. Recomendamos el uso del agente de unión dual. En caso de necesidad, aplique la primera capa de NATURAL FLOW opaco y deje fotopolimerizar por 40 segundos. Aplique NATURAL FLOW utilizando la punta aplicadora y use un pincel para acomodar el material. Deje fotopolimerizar durante 30 segundos y siga los procedimientos de pulido convencionales recomendados para resinas fotopolimerizables.

#### *PARA CEMENTACION DE FACETAS DE PORCELANA*

Selecciones el color haciendo una prueba de faceta con NATURAL FLOW en el propio diente, sin fotopolimerizar. Aísle completamente: proceda a realizar el acondicionamiento interno de la cerámica usando ácido fluorhídrico al 10 % por 1 minuto. Lave y seque. Aplique Silano sobre la superficie acondicionada por 32 minutos y seque. Haga un ataque ácido al esmalte y siga los procedimientos convencionales de adhesión para porcelana. Recomendamos el uso del agente de unión dual. Aplique NATURAL FLOW en la superficie interna de la faceta. Coloque la faceta, deje fotopolimerizar durante 30 segundos y siga los procedimientos de pulido convencionales recomendados para resinas fotopolimerizables.

MONTAL S A  
  
HECTOR M. JUSID  
PRESIDENTE

  
NORBERTO J. LATORO  
FARMACEUTICO  
M. N. N.º 10876 - M. P. N.º 14005  
DIRECTOR TECNICO

### **PARA PEGAR FRAGMENTOS**

Mantenga el fragmento fracturado en un medio ideal (dentro de la propia boca, en suero o en leche). Aísle perfectamente. Haga un bisel largo a partir de la fractura, tanto en el diente fracturado como en el fragmento. Haga un ataque ácido al esmalte adyacente a la fractura y a la dentina. Tanto en el diente fracturado como en el fragmento. Siga los procedimientos de adhesión convencionales en el diente y en el fragmento. Aplique NATURAL FLOW sobre los biselados y la superficie fracturada y coloque el fragmento en su lugar. Retire los excesos de material utilizando una sonda exploradora o un pincel. Deje fotopolimerizar durante 30 segundos y siga los procedimientos de pulido convencionales recomendados para resinas fotopolimerizables.

### **ALMACENAMIENTO**

Se debe conservar en envases herméticos, en temperaturas entre 2° C y 30° C. No someter a temperaturas elevadas.

Advertencia: inspeccionar el producto buscando alguna señal de daño. No utilice si el envase o el producto se encuentran dañados.

MUNTAL S.A. no controla factores relacionados a la actividad del profesional.

Ante cualquier consulta le rogamos se ponga en contacto con nosotros.  
[muntal@muntal.net](mailto:muntal@muntal.net) o [muntal@cuidad.com.ar](mailto:muntal@cuidad.com.ar)

### **Leer las instrucciones de Uso**



MUNTAL S.A.  
  
HECTOR M. JUSID  
PRESIDENTE

  
NORBERTO J. LOMBARDI  
FARMACEUTICO  
M. N. G.º 10376 - M. P. Nº 14035  
DIRECTOR TECNICO