



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **5458**

BUENOS AIRES, **27 AGO 2013**

VISTO el Expediente Nº 1-47-1086/13-2 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma AMPLITONE S.R.L. solicita la autorización de modificación del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos Nº PM 1123-6, denominado: AUDIFONO DIGITAL INTRACANAL.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT Nº 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Departamento de Registro y la Dirección de Tecnología Médica han tomado la intervención que les compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y por el Decreto Nº 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 5458

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1123-6, denominado: AUDIFONO DIGITAL INTRACANAL.

ARTICULO 2º- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1123-6.

ARTICULO 3º - Anótese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, gírese al Departamento de Registro para que efectúe la agregación del Anexo de modificaciones al certificado original y entrega de la copia autenticada de la presente Disposición; cumplido, archívese PERMANENTE.

Expediente N° 1-47 -1086/13-2.

DISPOSICIÓN N°

5458

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

### ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° ~~5450~~ **5450**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1123-6 y de acuerdo a lo solicitado por la firma AMPLITONE S.R.L., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en (RPPTM) bajo:

Nombre comercial /Genérico aprobado: PHONAK / ARGOSY. AUDIFONO DIGITAL INTRACANAL.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 2343/08

Tramitado por expediente N° 1-47-856/08-2

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION / RECTIFICACION AUTORIZADA
S.           NUEVOS MODELOS	<u>MARCA PHONAK</u>	<u>MARCA PHONAK</u>
	UNA CIC MC	UNA CIC MC
	UNA ITC HS	UNA ITC HS
	UNA FS	UNA FS
	UNA FSP	UNA FSP
	EXELIA ART CIC/MC P	EXELIA ART CIC/MC P
	PETITE	PETITE
	EXELIA ART CIC MC	EXELIA ART CIC MC
	PETITE	PETITE
	EXELIA ART ITC/HS	EXELIA ART ITC/HS
	PETITE	PETITE
	EXELIA ART ITC/HS VZ	EXELIA ART ITC/HS VZ
PETITE	PETITE	
EXELIA ART ITC/HS P	EXELIA ART ITC/HS P	



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T.

	PETITE	PETITE
	EXELIA ART FSP/P/FS	EXELIA ART FSP/P/FS
	VERSATA CIC/MC P	VERSATA CIC/MC P
	PETITE	PETITE
	VERSATA CIC/MC PETITE	VERSATA CIC/MC PETITE
	VERSATA ITC/HS P VZ	VERSATA ITC/HS P VZ
	PETITE	PETITE
	VERSATA MICRO PETITE	VERSATA MICRO PETITE
	VERSATA FS P, FS, ITC/HS	VERSATA FS P, FS, ITC/HS
	CERTENA CIC/MC P	CERTENA CIC/MC P
	PETITE	PETITE
	CERTENA CIC/MC PETITE	CERTENA CIC/MC PETITE
	CERTENA ITC/HS P DAZ	CERTENA ITC/HS P DAZ
	PETITE	PETITE
	CERTENA MICRO PETITE	CERTENA MICRO PETITE
	CERTENA FS P/FS, ITC/HS	CERTENA FS P/FS, ITC/HS
	CERTENA ITC/HS P DAZ	CERTENA ITC/HS P DAZ
	MILO PLUS CIC/MC	MILO PLUS CIC/MC
	MILO PLUS ITC/HS DAZ	MILO PLUS ITC/HS DAZ
	MILO PLUS FS/DAZ	MILO PLUS FS/DAZ
	AMBRA 10 PETITE	MILO PLUS FS P DAZ
	AMBRA 312 PETITE	AMBRA 10 PETITE
	AMBRA 312 UZ PETITE	AMBRA 312 PETITE
	AMBRA 312	AMBRA 312 UZ PETITE
	AMBRA 312 UZ	AMBRA 312
	AMBRA 13 UZ	AMBRA 312 UZ
	SOLANA 10 PETITE	AMBRA 13 UZ
	SOLANA 312 PETITE	



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

	SOLANA 312 UZ PETITE SOLANA 312 SOLANA 312 UZ SOLANA 13 UZ CASSIA 10 PETITE CASSIA 312 PETITE CASSIA 312 UZ PETITE CASSIA 312 CASSIA 312 UZ <u>MARCA ARGOSY</u> ARGOSY CIRA PLUS CIC/MC ARGOSY CIRA PLUS ITC/HS DAZ ARGOSY CIRA PLUS FS DAZ	SOLANA 10 PETITE SOLANA 312 PETITE SOLANA 312 UZ PETITE SOLANA 312 SOLANA 312 UZ SOLANA 13 UZ CASSIA 10 PETITE CASSIA 312 PETITE CASSIA 312 UZ PETITE CASSIA 312 CASSIA 312 UZ PHONAK CROS 312 PHONAK CROS 13 <u>MARCA ARGOSY</u> ARGOSY CIRA PLUS CIC/MC ARGOSY CIRA PLUS ITC/HS DAZ ARGOSY CIRA PLUS FS DAZ
Cambio de dirección de fabricante	PHONAK AG Laubisrutistrasse 28, CH-8712 Stäfa, Suiza. -UNITRON HEARING (Suzhou) Co. Ltd. N° 200 Suhong Road, Export Processing Zone 4D, Suzhou Industrial Park, P.R China 215021.	PHONAK AG Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, Suiza. -UNITRON HEARING (Suzhou) Co. Ltd., No 78, Qi Ming Road, Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, 215126 P.R. China



Ministerio de Salud  
**Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos**  
 A.N.M.A.T.

	-PHONAK OPERATIONS CENTER VIETNAM N° 41 VSIP Street 8 VSIP, Thuan An District, Binh Duong Province, Vietnam.	-PHONAK OPERATIONS CENTER VIETNAM N° 29A VSIP Street 8, Vietnam Singapore Industrial Park, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam.
Nuevos rótulos e instrucciones de uso		A fojas 105,109 a 121

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del (RPPTM) a la firma AMPLITONE S.R.L. Titular del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1123-6, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días..... **27 AGO 2013**.....

Expediente N° 1-47-1086/13-2


DISPOSICIÓN N°

**5458**

**Dr. OTTO A. ORSINGER**  
 SUB-INTERVENTOR  
 A.N.M.A.T.

PROYECTO DE RÓTULO

5758

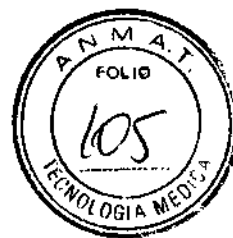

Fabricado por **PHONAK AG**,  
LAUBISRUTISTRASSE 28, CH – 8712, STAFA, SUIZA

UNITRON HEARING (SUZHOU) CO. LTD., NO. 78, QI MING ROAD, EXPORT  
PROCESSING ZONE B, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 215126 REPUBLICA  
POPULAR CHINA

PHONAK OPERATIONS CENTER VIETNAM, NO.29A VSIP STREET 8, VIETNAM  
SINGAPORE INDUSTRIAL PARK, THUAN AN TOWN, BINH DUONG PROVINCE,  
VIETNAM

Encapsulado por **AMPLITONE S.R.L.**  
Lavalle 1527, 1° piso, C.A.B.A., Argentina

Importado por **AMPLITONE S.R.L.**  
Lavalle 1527, 1° piso, C.A.B.A., Argentina

**Phonak CROS**

**Audífono digital Intracanal**

Modelos : Phonak CROS 312, Phonak CROS 13

Contenido: un audífono digital retroauricular Phonak CROS 6 pilas de Zinc

Aire 312,13 VENTA BAJO RECETA

Serie N°

Lea el Manual de Instrucciones.

Directora Técnica: Adriana Ehrlich, Fonoaudióloga, MN 5688

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM- 1123-06

RICARDO LOYEVNICOV  
Socio Gerente

**AMPLITONE S.R.L.**

ADRIANA EHRlich  
FONOaudióloga  
M.N. 5688



## PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

Fabricado por **PHONAK AG**,  
LAUBISRUTISTRASSE 28, CH - 8712, STAFA, SUIZA

UNITRON HEARING (SUZHOU) CO. LTD., NO. 78, QI MING  
ROAD, EXPORT PROCESSING ZONE B, SUZHOU INDUSTRIAL  
PARK, 215126 REPUBLICA POPULAR CHINA

PHONAK OPERATIONS CENTER VIETNAM, NO.29A VSIP  
STREET 8, VIETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARK, THUAN  
AN TOWN, BINH DUONG PROVINCE, VIETNAM

Encapsulado por **AMPLITONE S.R.L.**  
Lavalle 1527, 1° piso, C.A.B.A., Argentina

Importado por **AMPLITONE S.R.L.**  
Lavalle 1527, 1° piso, C.A.B.A., Argentina

### **Phonak CROS**

#### **Audífono digital Intra canal**

Modelos: **Phonak CROS 312 - Phonak CROS 13 - Milos Plus  
FS P Daz**

Contenido: un audífono digital Phonak CROS, Phonak Milo  
Plus FS P Daz y 6 pilas de Zinc Aire 312,13


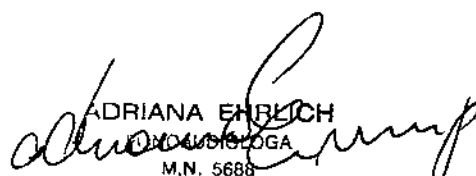
VENTA BAJO RECETA

Serie N°

Condiciones de transporte y almacenamiento: Durante el  
transporte y almacenamiento, la temperatura no deberá  
exceder de los límites de -20°/60° C con una humedad  
relativa del aire del 65% durante largos periodos. Una  
presión del aire de entre 500 y 1100 hPA no es perjudicial  
para el audífono.

Lea el Manual de Instrucciones.

  
RICARDO LOYEVNICOV  
Socio Gerente  
← **AMPLITONE S.R.L.**

  
  
ADRIANA EHRLICH  
ODONTOLOGA  
M.N. 5688



5458



## . Indicaciones de uso

El audífono digital intracanal Phonak CROS 312,13 y MILO PLUS FS P DAZ está indicado para ser usado en pacientes con pérdidas auditivas leves a severas.

Las siguientes instrucciones de uso describen los modelos de audífono con Tecnología Digital Intracanal. Phonak ha implementado esta tecnología auditiva en un sistema Phonak CROS y MILO PLUS FSP DAZ de sencilla y fácil utilización. Sus muchas funciones automáticas ofrecen la máxima calidad sonora, la máxima claridad verbal y un confort auditivo óptimo en la mayor parte de las situaciones auditivas.

  
RICARDO LOYEWICOV  
Socio Gerente  
AMPLITONE S.R.L.



  
ADRIANA EHRlich  
FONODILOGA  
M.N. 5686



ITE

Opción A: modelo  
media concha (HS)

Opción B: modelo  
concha (FS)

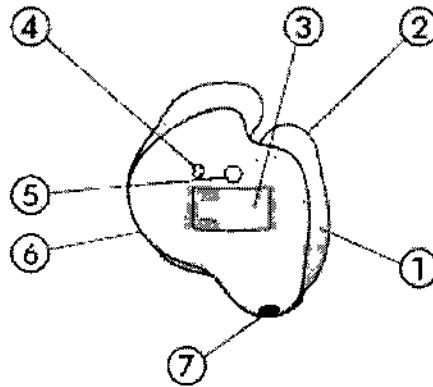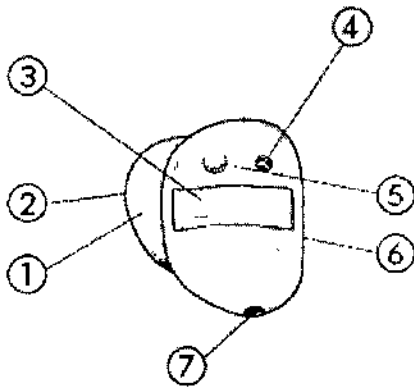


- ① Carcasa a medida
- ② Sistema anticerumen
- ③ Portapilas con conmutador de encendido/apagado
- ④ Entrada de micrófono protegida
- ⑤ Conmutador
- ⑥ Indicador derecho o izquierdo  
(derecho: rojo, izquierdo: azul)
- ⑦ Abertura

### Opciones de control de volumen


Para aumentar el volumen, pulse el botón del audífono derecho. Para disminuir el volumen, pulse el botón del audífono izquierdo (ilustración 1b).

  
RICARDO LOYEVNICOV  
Socio Gerente  
AMPLITONE S.R.L.

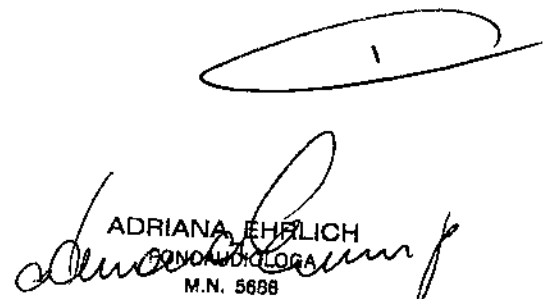  
ADRIANA EHELICH  
FONODIÓLOGA  
M.N. 5688


## Opción B: ITE

Izquierda

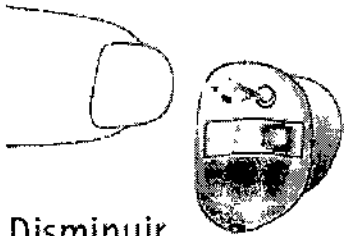

Disminuir  
el volumen

Derecha

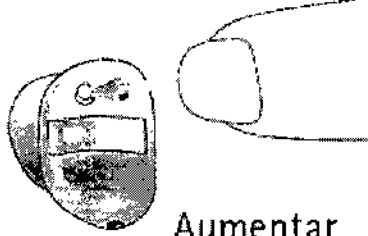

Aumentar  
el volumen

*ilustración 1b*

## Opciones de programa

Para cambiar un programa auditivo, pulse el conmutador que se muestra (ilustración 1d).

## Opción B: ITE




*ilustración 1d*

## Colocación de la pila y/o Sustitución de la pila

Retire el plástico protector de la nueva pila. Espere dos minutos antes de introducir la pila para activarla.

  
RICARDO LOYEVNICOV  
Socio Gerente  
AMPLITONE S.R.L.

  
ADRIANA EHRlich  
M.N. 5888

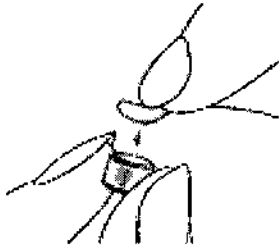

### Insercion de la pila

Tome el audífono con la mano y abra el porta pilas. Introduzca la pila de forma que pueda ver el símbolo + de ésta (Ilustración 3c/3d).

#### Opción B: ITE

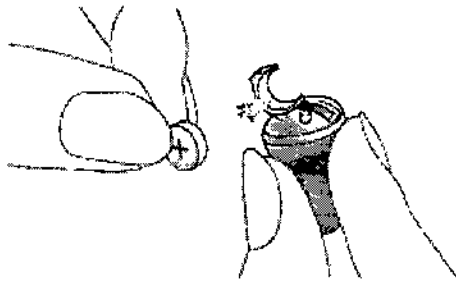


ilustración 3c

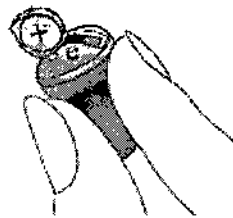


ilustración 3d

El audífono se enciende cerrando el porta pilas (Ilustración 4b).

#### Opción B: ITE

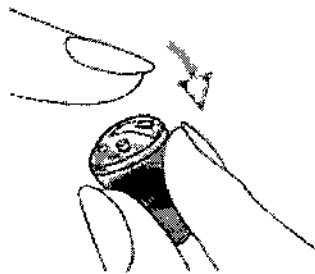



ilustración 4b

  
 RICARDO LOYEVNICOV  
 Socio Gerente  
 AMPLITONE S.R.L.

  
 ADRIANA EHRlich  
 FONOLÓLOGA  
 M.N. 5688

Ahora el audifono está encendido. Puede tardar hasta 15 segundos en iniciarse. (Cuando lleve puesto el audifono, oirá una señal sonora.)

### **Aviso de pila baja de carga**

Poco antes de que la pila se agote por completo, una señal acústica le avisará de ello. A partir de este momento tendrá 30 minutos para sustituir las pilas.

En el caso de pilas de alta calidad, esta reserva podrá ser superior, y el tono de aviso sonará aproximadamente cada media hora.


### **Identificación de los audifonos izquierdo y derecho**

Es importante usar el audifono correcto en cada oído. Su audioprotésista puede marcar sus audifonos. El código de color de la carcasa identifica los audifonos izquierdo y derecho. El código de color es el siguiente (Ilustración 5b).

**AZUL= audifono Izquierdo**

**ROJO= audifono Derecho**

Opción B: ITE

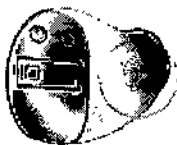

*ilustración 5b*

### **Apagado del audifono**

Apagado: Utilizando la pestaña, abra el porta pilas hasta alcanzar la posición de apagado ( Ilustracion 9b).

RICARDO LOYEVNICOV  
Socio Gerente

AMPLITONE S.R.L.

ADRIANA ZIBLICH  
FONOLOGA  
M.N. 5688

## Opción B: ITE

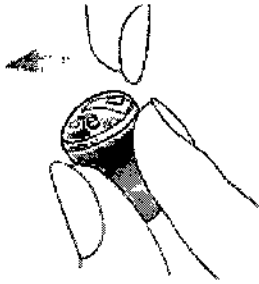


ilustración 9b

### Inserción del audífono

Este paso le muestra el modo correcto de introducir el audífono. Colocación del audífono ITE Phonak CROS y MILO PLUS FS P DAZ. Introduzca el extremo del audífono Phonak CROS y MILO PLUS FS P DAZ en el conducto auditivo (véase la parte rodeada por un círculo verde en la ilustración 5h). Tire suavemente del lóbulo de su oreja y coloque el audífono Phonak CROS y MILO PLUS FS P DAZ en la posición correcta. Asegúrese de que está bien colocado. Al principio use un espejo para comprobarlo.

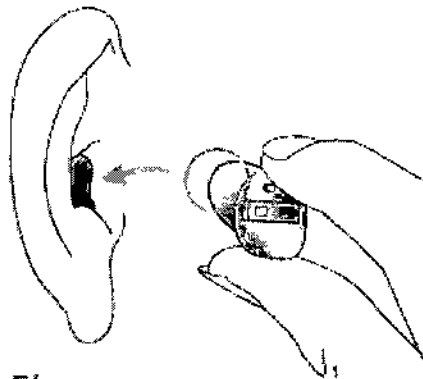


ilustración 5h



Si tiene problemas al colocar el audífono Phonak CROS y MILO PLUS FS P DAZ utilice la otra mano para tirar suavemente del lóbulo de la oreja hacia abajo. Esto permite que el conducto auditivo se abra un poco más para que pueda girar el extremo Phonak CROS y MILO PLUS FS P DAZ gradualmente hasta que se adapte correctamente.

  
RICARDO LOYEVNICOV  
Socio Gerente

AMPLITONE S.R.L.



  
ADRIANA EHRlich  
AUDIÓLOGA  
N.º 5688

Para aumentar el volumen, pulse el botón del audífono derecho. Para disminuir el volumen, pulse el botón del audífono izquierdo. Utilice el pulgar para sostener ligeramente el audífono.

Opción B: ITE

Izquierda  
Disminuir el volumen

Derecha  
Aumentar el volumen

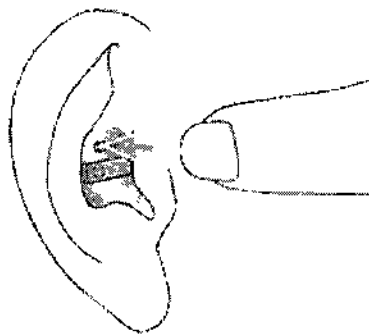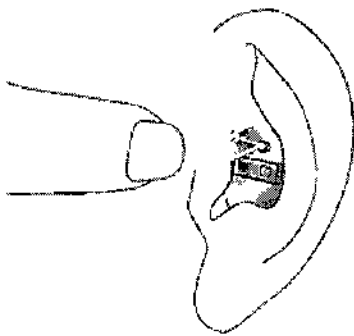

### Programas auditivos

Para seleccionar o cambiar un programa auditivo, pulse el conmutador que se muestra (ilustración 7b).

Opción B: ITE

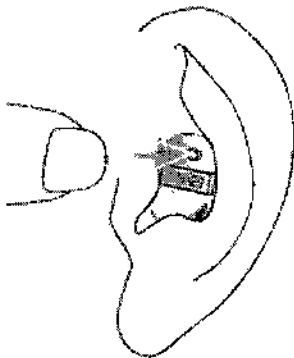


ilustración 7b



*Ricardo Loyevnicov*  
RICARDO LOYEVNICOV  
Socio Gerente  
AMPLITONE S.R.L.

*Adriana Ehrlich*  
ADRIANA EHRlich  
FONCAUBIOLOGIA  
M.N. 5688



Si lo pulsa de nuevo, cambia al siguiente programa. Una señal indica el cambio. Se oirá claramente un tono de señal únicamente si ha encendido el audífono y está correctamente colocado tras la oreja.

**Extraccion del Audifono**

Extracción del audifono ITE CROS (todos los modelos) y MILO PLUS FS P DAZ. Coloque su dedo pulgar detrás del lóbulo de la oreja (directamente detrás del cartílago, ilustración 8c) y presione suavemente hacia arriba para expulsar el audifono Phonak CROS y MILO PLUS FS P DAZ del conducto auditivo. Para mayor facilidad, haga movimientos de masticación con su mandíbula.


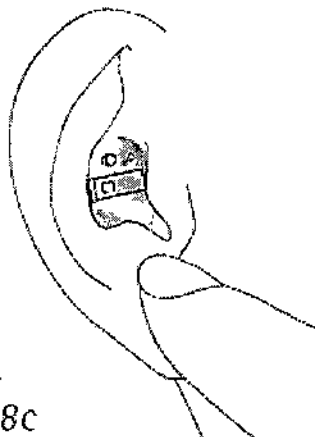


ilustración 8c

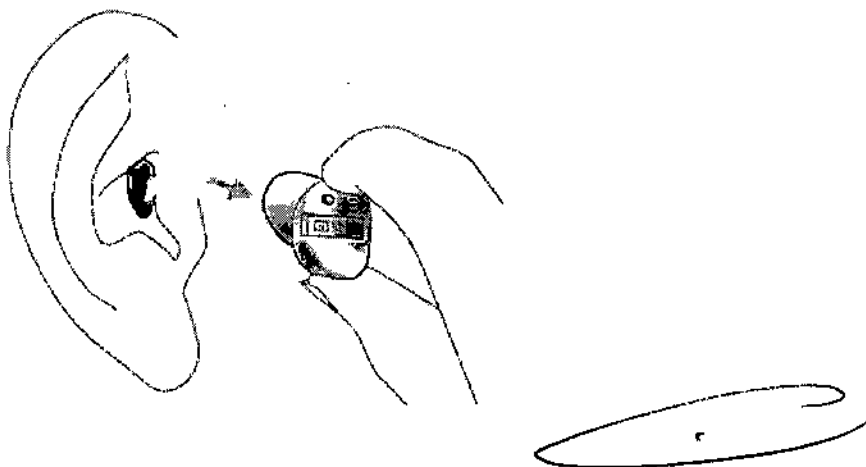

**Importante**


Pídale a su audioprotesista que le imprima la descripción completa de sus programas auditivos

*[Signature]*  
RICARDO LOYEVNICOV  
Socio Gerente  
AMPLITONE S.R.L.

*[Signature]*  
ADRIANA EHRlich  
OTOLINGÜISTA  
M.N. 5688



558

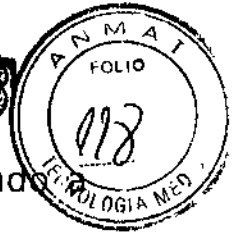

individuales y cómo acceder a ellos mediante el mando a distancia y / o su selector de programas.

### **Accesorios inalámbricos**

Phonak ha desarrollado una amplia gama de accesorios inalámbricos que le permiten obtener un uso óptimo y un control discreto del audífono. Estos incluyen, por ejemplo, mandos a distancia, módulos de conexión inalámbrica a la televisión y al ordenador, y mucho más. Esta gama de productos también incluye programas y accesorios que le pueden ayudar a hacer llamadas de teléfono con facilidad y mayor comodidad.


### **Sistemas FM**


Los sistemas FM son sistemas de comunicación inalámbricos formados por un transmisor y un receptor de radio. El transmisor se coloca junto a la fuente de sonido (p. ej. TV/radio/atril). Las palabras se transmiten clara y directamente al audífono en forma de señales de radio sin molestos ecos o ruidos ambientales.

### **ICOM (opcional)**

Es un accesorio opcional disponible para todos los modelos AUDEOS S. Con solo pulsar un botón, ICOM conecta su audífono a los dispositivos tecnológicos que le rodean (teléfonos móviles, equipos de audio, FM, etc. )

  
RICARDO LOYEVNICOV  
Socio Gerente  
AMPLITONE S.R.L.

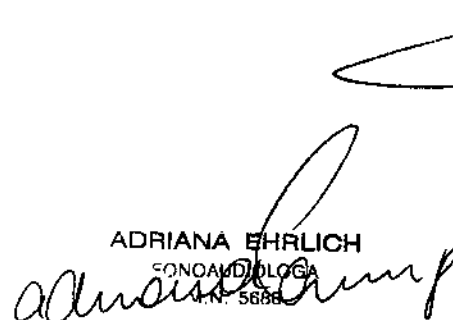
  
ADRIANA EHRlich  
CONDOMINIO  
N.º 5688

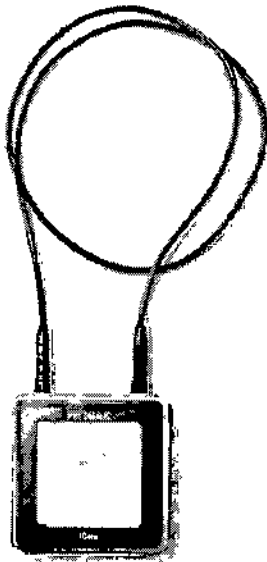

### Conexiones Bluetooth

ICOM ofrece una forma sencilla de conectar el teléfono celular a su audífono mediante Bluetooth y también es capaz de transmitir una señal de audio estéreo desde cualquier dispositivo con Bluetooth activado, como reproductores MP3, computadoras portátiles, PC y televisores

### Compatibilidad FM

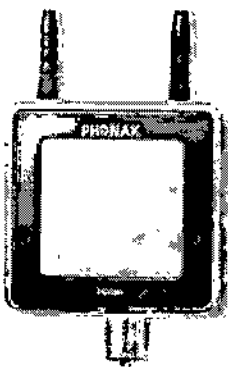


proporciona accesibilidad FM cuando se utiliza con el receptor FM universal Phonak

### • Advertencias

Las pilas de los audífonos son tóxicas. ¡No ingerir!

  
 RICARDO LOYEVNICOV  
 Socio Gerente  
 AMPLITONE S.R.L.

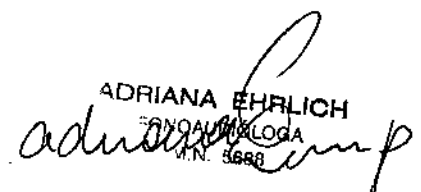  
 ADRIANA EHRlich  
 FONOLOGIA  
 M.N. 5688

Consérvelas fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. En caso de ingestión, consulte inmediatamente a su médico.

**Use sólo audífonos que hayan sido programados especialmente para usted por su audioprotesista.** Un audífono no adaptado a su capacidad auditiva no sólo podría ser ineficaz, sino también peligroso para su audición.

**Los rayos X** (por ej. de tomógrafos o de resonancia magnética) pueden afectar al correcto funcionamiento de sus audífonos. Le recomendamos quitarse los audífonos antes de una exploración radiológica y déjelos fuera de la sala de tratamiento.

**Los programas en el modo de micrófono direccional (AZ) reducen sobre todo los ruidos de fondo.** Esto quiere decir que, las señales de aviso y las señales acústicas de vehículos, provenientes de atrás, son suprimidas parcial o totalmente.

## Mantenimiento


### Notas importantes

- 1) Sustituya las pilas gastadas siempre por pilas nuevas. Puede devolver las pilas usadas a su audioprotesista.
- 2) Cuando no use sus audífonos, deje el portapilas abierto para que se evapore bien la humedad.
- 3) Si no usa sus audífonos durante un tiempo prolongado, guárdelos en su estuche de protección. Quite las pilas y deje abiertos los portapilas. Asegúrese de que sus audífonos están completamente secos antes de cerrar el estuche.
- 4) Proteja sus audífonos de la excesiva humedad y calor. Quítese siempre sus audífonos antes de ducharse, bañarse o nadar. No deje los audífonos cerca de una ventana o en el coche. Evite golpes y vibraciones fuertes.
- 5) Le recomendamos limpiar y deshumidificar diariamente sus audífonos. El sistema de limpieza Phonak es un kit de limpieza adecuado y completo. Su audioprotesista le recomendará los productos más apropiados para tal fin. Para la limpieza de sus audífonos, no utilice nunca

RICARDO LOYEVNICOV  
Socio Gerente

AMPLITONE S.R.L.

ADRIANA EHRlich  
AUDIOPROTESISTA  
N.º 5688

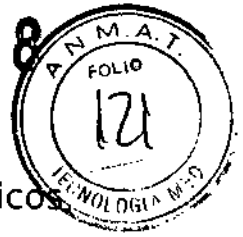

productos de limpieza tales como detergentes domésticos, jabón, etc.

6) La laca para el cabello, las cremas faciales y el maquillaje pueden dañar sus audífonos. Quítese los audífonos antes de ponerse productos cosméticos.

7) Si experimenta irritación o inflamación en o detrás de su oído, contacte a su audioprotesista.

8) Si sus audífonos no funcionan a pesar de haber colocado pilas nuevas, consulte a su audioprotesista.

El símbolo del cubo de basura tachado indica que este audífono no debe ser tratado como basura doméstica. Por favor lleve sus audífonos viejos o en desuso a un centro de recogida específico para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos o entréguelo a su audioprotesista, quien se encargará de retirarlos apropiadamente.

Asegurándose de que este producto es tratado de forma adecuada ayudará a prevenir potenciales efectos negativos para la salud y el medio ambiente.

#### • Condiciones de funcionamiento

El audífono ha sido diseñado para un funcionamiento sin problemas en todas las condiciones climáticas habituales.

Directora Técnica: Adriana Ehrlich, Fonoaudióloga, MN 5688

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1123-06

RICARDO LOYEVNICOV  
Socio Gerente

AMPLITONE S.R.L.

ADRIANA EHRlich  
FONO AUDIÓLOGA  
M.N. 5688