



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 7868

"2010- AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
REVOLUCION DE MAYO"

BUENOS AIRES, 03 DIC 2010

VISTO el Expediente N° 1-47-7844/10-3 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones GE SISTEMAS MEDICOS DE ARGENTINA S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 7868

"2010- AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
REVOLUCION DE MAYO"

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de Marca: General Electric, nombre descriptivo SISTEMAS RADIOGRAFICOS DIGITALES PARA MAMOGRAFIA y nombre técnico Sistemas Radiográficos, Digitales, para Mamografía, de acuerdo a lo solicitado, por GE SISTEMAS MEDICOS DE ARGENTINA S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 78 y 4 a 21 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1407-121, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 7868

"2010- AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
REVOLUCION DE MAYO"

conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-7844/10-3

DISPOSICIÓN N°

7868

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2010- AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
REVOLUCION DE MAYO"

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto
en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°**7868**.....

Nombre descriptivo: SISTEMAS RADIOGRAFICOS DIGITALES PARA MAMOGRAFIA

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-432 - Sistemas Radiográficos,
Digitales, para Mamografía

Marca: General Electric

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: Sistema mamográfico que permite localizar lesiones de
mama en tres dimensiones con el accesorio estereotáxico.

Modelo/s: SENOGRAPHE ESSENTIAL STEREOTAXY.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS SCS

Lugar/es de elaboración: 283 RUE DE LA MINIERE BP 34, BUC, CEDEX, Francia.

Expediente N° 1-47-7844/10-3

DISPOSICIÓN N° **7868**

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.


"2010- AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
REVOLUCION DE MAYO"

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

7868
.....

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

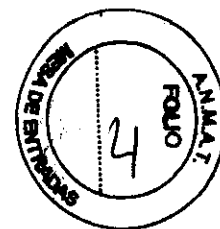

INSTRUCCIONES DE USO

SENOGRAPHE ESSENTIAL STEREOTAXY

El modelo de las instrucciones de uso debe contener las siguientes informaciones cuando corresponda:

3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítem 2.4 y 2.5;

Fabricante: GE Medical Systems
Dirección: 283 Rue de la Minière, B.P. 34 – 78533 –
Buc Cedex France

Importador: GE Sistemas Médicos de Argentina S.A.
Dirección: Ing. Butty 240 Piso 8, Capital federal,
Argentina

Equipo: Sistema de Mamografía Digital con esterotaxia.

Modelo: Senographe Essential Stereotaxy
Serie: S/N XX XX XX

Condición de Venta: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Producto Autorizado por ANMAT : PM-1407-121
Director técnico: Ing. Eduardo Fernández

3.2. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados;

Requerimientos Regulatorios

Este producto cumple con los requerimientos regulatorios de las siguientes instituciones:

GE Sistemas Médicos de Argentina S.A.
Marcelo Garófalo
Apoderado

Ing. Eduardo Domingo Fernández
Director Técnico



- Consejo Directivo 93/42/EEC concerniente a aparatos médicos: la etiqueta fijada al producto testifica el cumplimiento al Consejo Directivo.
- Código de Regulaciones Federales Título 21, Sub capítulo J – salud radiológica.
- Underwriters' Laboratories, Inc. (UL), un laboratorio de pruebas independiente.
- Asociación de Normas Canadienses. Canadian Standards Association (CSA).
- Comisión Electrotécnica Internacional. International Electrotechnical Commission (IEC), organización de normas internacionales, cuando sea aplicable.

El cumplimiento de estas normas es evidenciado por la presencia de las etiquetas adecuadas en la parte exterior de la unidad estereotáxica.

- USA/HHS: La ley federal en Los Estados Unidos de Norteamérica restringe el uso de este aparato por un medico o por ordenes de éste mismo.
- *General Electric Sistemas Médicos* es una compañía certificada ISO 9001 y EN 46001.

Advertencia contra los rayos X

ATENCIÓN

Los aparatos de rayos X son peligrosos para el paciente y el manipulador cuando no se cumplen las normas de protección.

Aunque este aparato está construido según las normas de seguridad más estrictas, la radiación X constituye un peligro al ser manipulado por personas no autorizadas o incompetentes. Una exposición excesiva a la radiación X puede causar daños al organismo. Por consiguiente, se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar que las personas incompetentes o no autorizadas utilicen este aparato, lo que sería un peligro para los demás y para sí mismas.

Antes de efectuar las manipulaciones, las personas habilitadas y competentes en el uso de este aparato, deberán informarse sobre las normas de protección fijadas por la Comisión Internacional de la Protección Radiológica, Anales N° 60: Recomendaciones de la Comisión Internacional sobre la Protección Radiológica y normas nacionales y deben haber sido formadas en el uso de este equipo.

Al instalar un dispositivo de biopsia:

- **Asegúrese de que todos los tornillos de sujeción estén apretados para evitar movimientos inesperados.**
- **Para evitar causar daños en el equipo y/o lesiones en la paciente, se recomienda NO girar el mando Z después de la instalación de un dispositivo de biopsia.**
- **Los ajustes de los mandos X e Y deben realizarse extremando las precauciones para evitar que la paciente pudiera sufrir alguna lesión.**

G.E. Sistemas Médicos de Argentina S.A.
Marcelo Garófalo
Apoderado

Ing. Eduardo Domingo Fernández
Director Técnico



ADVERTENCIA

Los circuitos eléctricos que hay en el interior del equipo pueden hacer uso de voltajes capaces de provocar lesiones graves o la muerte a causa de descargas eléctricas. Con el fin de evitar este peligro, no retire nunca ninguna de las cubiertas de la caja.

Respete los siguientes procedimientos de seguridad con el fin de evitar descargas eléctricas o lesiones graves a los operadores y pacientes, así como para evitar un funcionamiento incorrecto o avería del sistema.

- Todas las conexiones eléctricas al equipo deben realizarse fuera del entorno de los pacientes. No toque al paciente y un conector o conexión simultáneamente.
- No derive, puentee o desactive de cualquier otra forma los enclavamientos de seguridad.
- No retire ninguna de las cubiertas del ensamblaje. Sólo los representantes capacitados del servicio técnico pueden efectuar reparaciones.
- No coloque comida, bebidas ni recipientes que las contengan sobre alguna parte del equipo, ya que, si caen o se vierten, pueden provocar cortocircuitos.
- Desconecte siempre el equipo de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Para limpiarlo, utilice un paño ligeramente humedecido o una esponja.


- Sólo los ingenieros calificados del servicio técnico tienen permiso para llevar a cabo tareas de servicio técnico o reparación del sistema.

ADVERTENCIA

El sistema de rayos X no es impermeable. Si entran en la unidad agua, jabón u otros líquidos, pueden provocar cortocircuitos, descargas eléctricas o fuego. Si entra líquido en el sistema, NO conecte la unidad al suministro eléctrico. Si entra líquido dentro del equipo, desconecte el cable de corriente y no haga funcionar el sistema hasta que haya sido limpiado e inspeccionado por un ingeniero cualificado del servicio técnico.

G.E. Sistemas Médicos de Argentina S.A.
Marcelo Garófalo
Apoderado

Ing. Eduardo Domingo Fernández
Director Técnico

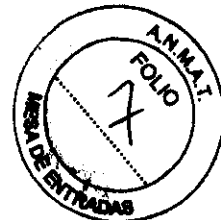

Protección contra descargas eléctricas

Este equipo ha sido clasificado como tipo B según la normativa IEC60601-1.

Este equipo cumple las siguientes normativas de seguridad: IEC 60601-1, IEC 60601-1-1, IEC 60601-2-32.



PELIGRO: Según la normativa MDD/93/A2/CEE, esta unidad está equipada con filtros EMC. Si la unidad no está conectada a tierra de manera correcta, es posible que el usuario pueda sufrir descargas eléctricas.

Protección contra radiación excesiva o no deseada

Declaración de conformidad: Esta unidad de rayos X cumple la normativa IEC 60601-1-3 que indica que cumple los requisitos generales de radioprotección en equipos de rayos X.

Este equipo cumple los requisitos de la normativa IEC 60601-1-3.

Entorno de instalación

Independientemente de los requisitos de instalación especificados por el fabricante con el fin de cumplir con las normas legales, un experto cualificado debe llevar a cabo un control adicional de la protección contra la radiación, con arreglo a las normativas vigentes. Este control de la protección debe repetirse tras cada cambio realizado en el equipo, en la carga de trabajo o en las condiciones de funcionamiento que pueda aumentar significativamente la probabilidad de que las personas reciban más radiación que la del equivalente de la dosis máxima permisible.

El sistema no está diseñado para ser utilizado en presencia de anestésicos explosivos. La falta de atención a esta advertencia puede provocar un incendio o una explosión.

Conexión eléctrica a tierra

El equipo sólo debe conectarse a tomas de corriente dotadas del correspondiente conductor de toma de tierra del equipo.

Aviso de seguridad

Este equipo produce rayos X que pueden ser peligrosos tanto para el operador como para otras personas que estén en las cercanías a menos que se cumplan por completo los procedimientos de exposición segura establecidos.

Dispositivos externos

No conecte ningún dispositivo a este sistema si no aparece descrito o aprobado en estas instrucciones.

Cualquier equipo adicional o dispositivo externo debe ser conectado exclusivamente por personal del servicio técnico autorizado y/o por un representante de GE OEC Medical Systems. **Todo equipo adicional que se conecte a las interfaces externas de la unidad debe cumplir con los requisitos establecidos en el estándar IEC 60601-1-1.**

si se hace funcionar el sistema junto con otros dispositivos eléctricos a partir de una toma con varios enchufes, la fuga de corriente puede aumentar. En tal caso, el operador tiene la responsabilidad de garantizar que se sigan cumpliendo los requisitos de IEC 60601-1-1/IEC 60601-1.

G.E. Sistemas Médicos de Argentina S.A.
Marcelo Garófalo
Apoderado

Ing. Eduardo Domingo Fernández
Director Técnico

3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura;


Senographe Estereotaxia es un accesorio opcional para el sistema digital de campo completo Senographe. Está diseñado para localizar con precisión las lesiones en la mama en tres dimensiones, utilizando información extraída de pares estereotácticos de imágenes bidimensionales. Su objetivo es ofrecer información orientativa para intervenciones (tales como biopsias, localización prequirúrgica o dispositivos de tratamiento).

Senographe Estereotaxia incluye el posicionador estereotáctico Senographe con adaptadores para biopsias de enfoque vertical y/o lateral, y la aplicación informática de estereotaxia.

2 Descripción general


Se presupone que los lectores de este manual están familiarizados con el manual del operador del sistema de adquisición Senographe.

- Se accede automáticamente a la aplicación de estereotaxia al instalar el posicionador estereotáctico. Se utiliza para realizar un examen estereotáctico, localizar estructuras mamarias tales como masas o microcalcificaciones en tres dimensiones. Cuando se ha localizado una estructura, se envía su información coordinada al *posicionador estereotáctico*, donde se usa para colocar con precisión una aguja adecuada para realizar histologías/citologías o colocar el alambre de enganche.
- Las imágenes de rayos X convencionales se toman con el haz de rayos X en posición perpendicular al receptor de imagen; sólo se obtiene información bidimensional (coordenadas X e Y). En estereotaxia, el brazo del tubo del Senographe puede inclinarse de forma independiente del receptor de imagen, lo que permite calcular la información tridimensional (X, Y, Z) de imágenes capturadas a $\pm 15^\circ$ con respecto a una línea perpendicular al plano del receptor de imagen. Entonces, esta información se envía al posicionador estereotáctico.
- El posicionador estereotáctico es una unidad completamente integrada que se instala en el receptor de imágenes de Senographe, en lugar del bucky. Incluye un compresor (independiente del sistema de compresión principal) que se emplea para inmovilizar la mama durante el procedimiento. El compresor utilizado para los procedimientos de enfoque vertical presenta una apertura para permitir el paso de las agujas; para los procedimientos de enfoque lateral, se utiliza un compresor sin apertura. La unidad incluye un soporte de aguja que admite guías de aguja intercambiables para conseguir un posicionamiento exacto de diversos tipos de aguja. Está preparado para el uso de dispositivos de biopsia accionados por resorte y por vacío.
- Una vez identificada y localizada un área de interés por medio del software, se envían sus coordenadas tridimensionales al posicionador, que desplaza las guías de aguja a la posición exacta necesaria, en función del tipo de aguja que se vaya a utilizar. Si se está utilizando un dispositivo de biopsia, se calcula la posición deseada para colocar la aguja en la posición previa al disparo. También pueden moverse las guías con la mano. A continuación, se introduce la aguja en las guías y se empuja dentro de la mama de forma manual. Las guías aseguran que el extremo de la aguja se posiciona con la precisión necesaria.

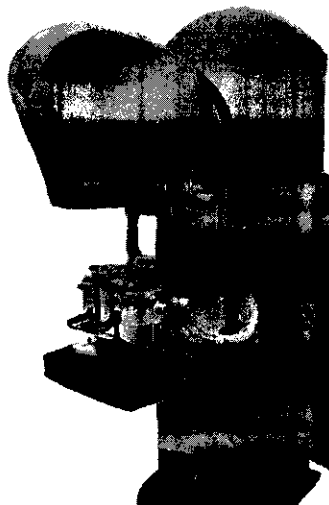

En este capítulo se ofrece una introducción de los componentes utilizados en el sistema de estereotaxia Senographe.

- La configuración estándar de Senographe Estereotaxia incluye:
 - El posicionador estereotáctico, que se muestra en la sección 2 *Posicionador estereotáctico*, y descrito con más detalle en el capítulo 5 *Posicionador estereotáctico* en la página 37.
 - Accesorios suministrados con el posicionador estereotáctico, que se muestra en la sección 3 *Accesorios incluidos con el posicionador estereotáctico*. Incluyen el compresor con apertura, adaptadores para guías de aguja utilizadas con las agujas en enfoque vertical, una guía para su uso con el kit de soporte lateral y un maniquí, utilizado para calibrar y verificar la precisión en el enfoque vertical.
 - Kit de soporte vertical; los componentes del kit se muestran en la sección 4 *Componentes del kit de soporte vertical*. Este kit, que se entrega en una caja de transporte, contiene los elementos necesarios para montar las herramientas de intervención (agujas, dispositivos de biopsia, etc.) para su uso en el enfoque vertical.
 - Kit de soporte lateral; los componentes del kit se muestran en la sección 5 *Componentes del kit de soporte lateral*. Este kit, que se entrega en una caja de transporte, contiene los elementos necesarios para montar las herramientas de intervención (agujas, dispositivos de biopsia, etc.) para su uso en el enfoque lateral. Incluye el compresor sin apertura y un maniquí utilizado para calibrar las herramientas de enfoque lateral y verificar la precisión de este enfoque.
- Las guías de aguja comunes se muestran en la sección 6 *Guías de aguja*. GE Healthcare o el fabricante del dispositivo de biopsia pueden suministrar guías de aguja apropiadas para el dispositivo de biopsia utilizado y para el tipo de intervención.

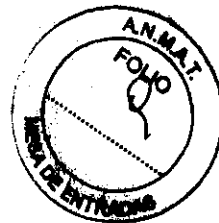

2 Posicionador estereotáctico

Nombre del componente	Código	Comentario	Ilustración
Posicionador estereotáctico	SP	El posicionador estereotáctico es una unidad completamente integrada que se instala en el receptor de imágenes de Senographe, en lugar del bucky. Se utiliza un compresor acoplado al posicionador, independientemente del sistema de compresión principal, para inmovilizar la mama durante los procedimientos estereotácticos. El compresor utilizado para los procedimientos de enfoque vertical presenta una apertura para permitir el paso de las agujas; para los procedimientos de enfoque lateral, se utiliza un compresor sin apertura. La unidad incluye un soporte de aguja que admita guías de aguja intercambiables para conseguir un posicionamiento exacto de diversos tipos de aguja.	

Nombre del componente	Código	Comentario	Ilustración
Soporte del dispositivo de biopsia	V1	Se acopla por encima del cabezal del SP para sostener dispositivos de biopsia en enfoque vertical.	
Soporte de Mammotome Biopsys	V2	Soporte montado en dispositivos de Mammotome Biopsys para su uso en enfoque vertical. Se desliza en el soporte de dispositivos de biopsia V1.	
Soporte de Mammotome ST	V3	Soporte montado en dispositivos de Mammotome ST para su uso en enfoque vertical. Se desliza en el soporte de dispositivos de biopsia V1.	

Nombre del componente	Código	Comentario	Ilustración
Guía de aguja de plástico	NGP	Las agujas de estereotaxia atraviesan y se guían por medio de los orificios presentes en las guías de agujas. Se emplean para adaptar soportes metálicos para diferentes tamaños y/o tipos de aguja.	
Guías de aguja de plástico:	Se suministran esterilizadas, para un solo uso, en paquetes de 10 (5 pares). Diámetros (mm): 0,9, 1,0, 1,2, 1,4, 1,8, 2,25		
Guía de aguja de metal.	NGM	Las agujas de estereotaxia atraviesan y se guían por medio de los orificios presentes en las guías de agujas. Se emplean para adaptar soportes metálicos para diferentes tamaños y/o tipos de aguja.	
Guías de aguja de metal:	Reutilizables, a esterilizar antes de utilizar. Se entregan en paquetes de 4 (2 pares). Diámetros (mm): 0,9, 1,0, 1,2, 1,4, 1,8, 2,25*, 2,9*, 3,2* (* = sin gancho de retención)		
Guía de aguja metálica para agujas de Mammotome.	NG	Encaja en la sujeción inferior del soporte de aguja del SP para guiar las agujas de Mammotome en el enfoque vertical. Disponibles para agujas 8G, 11G o 14G.	
Guías de aguja metálicas para Mammotome:	Reutilizables, a esterilizar antes de utilizar. Se entregan en paquetes de 5. Disponibles para 8G, 11G o 14G.		

3-3 Maniquí de enfoque vertical

Nombre del componente	Código	Comentario	Ilustración
Maniquí de enfoque vertical	VAP	El maniquí de enfoque vertical se utiliza con agujas FNA para realizar pruebas de precisión del enfoque vertical. Su uso se describe en el Capítulo 16 Programa de mantenimiento, sección Prueba de control de calidad 4 - Comprobación de la precisión antes de usar agujas FNA nuevas en el enfoque vertical, en la página 185	

3-4 Herramientas de calibración


Nombre del componente	Código	Comentario	Ilustración
Herramientas de calibración (para uso por parte del técnico de servicio)	SPT	Herramientas para uso por parte del técnico durante la calibración inicial y la configuración del posicionador estereotáctico.	

3 Compresor estéreo

El compresor estéreo se utiliza para inmovilizar la mama durante la exposición y la punción.


Una apertura en el compresor permite la penetración de la aguja en la mama en el enfoque vertical. Se incluye un compresor sin apertura para su uso en el enfoque lateral.

El conjunto del compresor estéreo incluye dos componentes, el soporte del compresor (A), y el compresor de plástico (B).

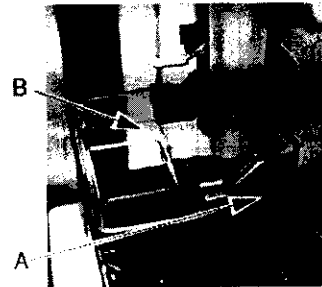





2 Posicionador estereotáctico

La ilustración siguiente muestra el posicionador estereotáctico sobre su soporte de mesa. A continuación, se ofrece una breve descripción de cada uno de los componentes y mandos incluidos. En el Capítulo 6 *Instalación del posicionador estereotáctico, sección 1 Instalación del posicionador estereotáctico en la página 41*, encontrará información sobre la instalación de la unidad.

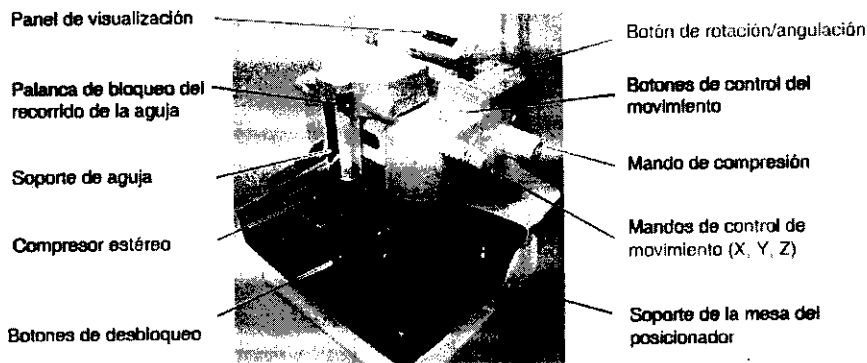

- **Panel de visualización.** En este panel se ve la información sobre el posicionamiento. Cuando no está en uso, el panel se guarda en su soporte sobre la unidad, tal como se muestra. Durante el uso, puede colocarse en la parte lateral de la unidad, sujeto mediante su parte posterior magnética.
- **Compresor estéreo y mandos de compresión.** El compresor se utiliza para inmovilizar la mama durante la exposición y la punción. Una apertura en el compresor permite la penetración de la aguja en la mama en el enfoque vertical. Se incluye un compresor sin apertura para su uso en el enfoque lateral. En la sección 3 *Compresor estéreo en la página 39* encontrará información sobre la instalación y el desmontaje del compresor.
La compresión se aplica de forma manual, con uno de los dos mandos de compresión (uno a cada lado de la unidad).
- **Soporte de mama.** El soporte de mama forma parte del conjunto del posicionador estereotáctico. El conjunto se monta sobre el detector de imagen de igual modo que otros soportes de mama (bucky y soportes de ampliación). Hay cuatro cruces grabadas en el soporte de mama para indicar los límites de la ventana de biopsia.

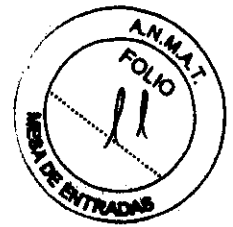

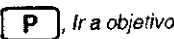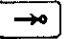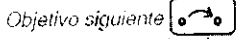- **Mandos de control del movimiento.** Hay tres mandos para colocar de forma manual el soporte de aguja en los tres ejes, X, Y y Z. Estos mandos se encuentran a ambos lados del SP. Tenga en cuenta que la dirección de uso del mando que controla el movimiento en el eje Y es distinta de la del mando correspondiente en el posicionador utilizado en Senographe DS. En Essential, el movimiento del mando de adelante hacia atrás aumenta el valor Y (es decir, movimiento en el sentido de las agujas del reloj para el mando derecho, en el sentido contrario a las agujas del reloj para el mando izquierdo).
- **Botones de control del movimiento.** Hay dos conjuntos de tres botones (un conjunto a cada lado de la unidad) para controlar el movimiento motorizado del soporte de aguja: *Devolver a la base* , *Ir a objetivo*  y *Objetivo siguiente* . Una luz situada junto a cada botón *Ir a objetivo* se ilumina en verde para indicar que se ha alcanzado la posición deseada, o parpadea (en verde) para indicar que el soporte de aguja se encuentra en la posición Base.
- **Botones de rotación/angulación.** Hay dos botones (uno a cada lado de la unidad) que permiten alternar entre los modos de rotación y angulación al colocar el estativo para exposiciones estereotácticas. Se enciende una luz verde junto a cada botón con el modo de angulación en uso. Consulte el Capítulo 10 *Preparación de los exámenes, sección 2 Colocación del brazo en la página 98*.
- **Palanca de bloqueo del recorrido de la aguja.** No se permite el movimiento motorizado a menos que esta palanca se haya empujado hacia la derecha para bloquear el recorrido de la aguja e impedir la inserción de la misma.



- **Soporte de aguja.** El soporte incluye dos fijaciones para adaptadores de guía de aguja extraíbles, que sujetan las guías de aguja para su uso en procedimientos de enfoque vertical. Cuando se usan algunos dispositivos de biopsia en el enfoque vertical, los adaptadores pueden retirarse o sustituirse. Consulte las instrucciones de instalación del dispositivo de biopsia. En procedimientos de enfoque lateral, se retiran ambos adaptadores, y se coloca una guía para la barra de sujeción del brazo lateral en la sujeción superior. Consulte las instrucciones de instalación para el enfoque lateral. El movimiento vertical de la sujeción superior permite colocar con precisión la herramienta de punción. El movimiento puede ser motorizado o manual (girando el mando de control Z). La sujeción inferior puede subirse y bajarse de forma manual, según sea necesario.

3-1 Instalación y extracción del soporte del compresor

- El soporte del compresor puede instalarse o retirarse del posicionador estereotáctico con o sin el compresor de plástico colocado.

ⓘ Atención:


Para evitar daños en el compresor cuando se instala o retira el soporte, presione únicamente sobre la parte metálica del soporte. No aplique presión al compresor de plástico.

- Para instalar el soporte en el posicionador, manténgalo bajo la ranura de montaje, en la parte frontal del posicionador, tal como se observa en la ilustración. Presione con firmeza el soporte hacia arriba hasta que encaje en su posición.
- Para retirar el soporte, realice el procedimiento inverso. Presione el soporte con firmeza hacia abajo para soltarlo y retirarlo.



3-2 Desmontaje e instalación del compresor de plástico

- Siga la secuencia de las ilustraciones siguientes para retirar el compresor de plástico de su soporte:
 1. Compresor bloqueado en su posición normal sobre el soporte metálico
 2. Manteniendo los pulgares en el compresor para evitar que se caiga, desbloquee girando las dos palancas de bloqueo hasta la posición vertical.
 3. Tire del compresor.
 4. Levante ligeramente la parte frontal del compresor. Ahora puede retirarse del soporte.

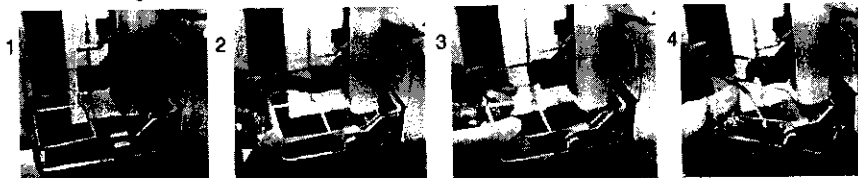

- Realice el procedimiento inverso para instalar el compresor de plástico. Tras finalizar, no olvide bloquear el compresor girando ambas palancas de bloqueo hasta la posición horizontal.

3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos;

1 Limpieza, desinfección y esterilización - Introducción

CUIDADO

Para evitar la transmisión de enfermedades entre pacientes, es preciso limpiar, desinfectar y esterilizar los dispositivos adecuadamente.

Asegúrese de mantener todo el material limpio.

Asegúrese de limpiar y desinfectar o de esterilizar bien los dispositivos que entren en contacto con la paciente y el equipo que pueda ensuciarse durante el uso.

Las tablas siguientes incluyen los requisitos habituales, pero no abarcan todas las situaciones, y deben utilizarse únicamente a modo de orientación.

2 Definiciones de categorías de componentes

Categoría del componente	Definición
Sin contacto	Componentes que no entran en contacto con la paciente
Contacto	Componentes que entran en contacto con la paciente: - Piel "intacta" - Piel "no intacta" - Membranas mucosas sin penetrar en la piel
Contacto intenso	Componentes que rutinariamente penetran la piel y componentes en contacto directo con los anteriores.

3 Prácticas de higiene

Categoría del componente	Ejemplo	Condiciones	Prácticas de higiene necesarias
Sin contacto	Panel de visualización en el posicionador estereotáctico	N/A.	Limpieza: Siga las instrucciones del capítulo <i>Higiene del sistema</i> del Manual del operador del sistema de adquisición Senographe.
Contacto	Cuerpo del posicionador estereotáctico, que incluye: - Palanca de bloqueo del recorrido de la aguja - Botón de rotación/angulación - Botones de control de movimiento - Mandos de control manual (X, Y, Z) Compresores Soporte de mama Todos los componentes de los kits de soporte lateral y vertical	Sin riesgo de contaminación cruzada.	Desinfección - nivel bajo: Siga las instrucciones del capítulo <i>Higiene del sistema</i> del Manual del operador del sistema de adquisición Senographe.
		Riesgo de contaminación cruzada	Desinfección - nivel alto: Siga las instrucciones del capítulo <i>Higiene del sistema</i> del Manual del operador del sistema de adquisición Senographe.
Contacto intenso	Guías de aguja metálicas (también denominadas 'casquillos metálicos').	N/A	Esterilización: Siga las instrucciones que se proporcionan en el Manual del operador <i>Esterilización de componentes metálicos utilizados en procedimientos de estereotaxia</i> (5308817-1-199).



1 Introducción

En este capítulo se describen los procedimientos de mantenimiento previstos para conseguir el máximo el nivel de rendimiento del equipo, incluidas las pruebas de control de calidad de Senographe Estereotaxia.

El capítulo contiene las siguientes secciones:

- Sección 2 *Mantenimiento por parte del técnico de servicio en la página 173*
- Sección 3 *Pruebas de control de calidad del técnico radiólogo o médico especialista en la página 174*
- Sección 4 *Hojas de registro de los resultados de las pruebas en la página 199*

2 Mantenimiento por parte del técnico de servicio

Este equipo no requiere ningún procedimiento de mantenimiento programado por parte del representante técnico de GEMS ni de personal con una cualificación y formación similares.

3 Pruebas de control de calidad del técnico radiólogo o médico especialista

- Las pruebas de control de calidad son un tipo de comprobaciones que garantizan que Senographe Estereotaxia funciona de acuerdo con sus normas de diseño.
- Las pruebas de control de calidad se describen en las secciones siguientes:
 - Prueba de control de calidad 1 - Prueba de bloqueo del recorrido de la aguja, page 175*
 - Prueba de control de calidad 2 - Precisión de localización - Enfoque vertical, page 177*
 - Prueba de control de calidad 3 - Comprobación de la precisión antes de usar agujas CB o VAD nuevas en el enfoque vertical., page 181*
 - Prueba de control de calidad 4 - Comprobación de la precisión antes de usar agujas FNA nuevas en el enfoque vertical., page 185*
 - Prueba de control de calidad 5 - Precisión de localización - Enfoque lateral, page 191*
 - Prueba de control de calidad 6 - Comprobación de la precisión antes de usar una herramienta de punción nueva en el enfoque lateral, page 195*
- Todas las pruebas deben realizarse como mínimo con la frecuencia especificada
- Se pueden copiar las tablas proporcionadas en la sección 4 *Hojas de registro de los resultados de las pruebas en la página 199* para anotar en ellas los resultados de las pruebas.
- El Senographe Estereotaxia se utiliza con el sistema Senographe, que también funciona como un sistema de mamografía digital de campo completo para el examen y diagnóstico mamográfico. Por lo tanto, además de las pruebas que se realizan para mantener la calidad de mamografía, se deben realizar las pruebas que se describen en esta sección según los estándares de mamografía de calidad de MQSA para el rendimiento del equipo [21 CFR 900.12(b)] y control de calidad [21 CFR 900.12(e)]. El manual de control de calidad de Senographe incluye información adicional referente a estas pruebas

Prueba de control de calidad 1 - Prueba de bloqueo del recorrido de la aguja

Frecuencia: Cada día que se realicen exámenes de estereotaxia, antes del primer examen del día. Si no se realizan exámenes de estereotaxia, la prueba se debe efectuar al menos una vez al mes para garantizar la seguridad de uso.

Objetivo: Garantizar la desactivación del movimiento motorizado del posicionador de la aguja cuando el recorrido de la aguja está abierto (desbloqueado)

CUIDADO

El propósito del bloqueo del recorrido de la aguja es impedir cualquier movimiento motorizado del posicionador cuando haya una aguja instalada. El bloqueo del recorrido de la aguja no impide el movimiento manual del posicionador cuando se utilizan los mandos X, Y y Z.

Equipo: Ninguno

Condiciones de la prueba:

- El posicionador no debe realizar ningún movimiento motorizado cuando el recorrido de la aguja esté abierto.
- Si es posible introducir una aguja con el recorrido de la aguja cerrado o si se puede realizar el movimiento motorizado del posicionador de la aguja mientras el recorrido de la aguja está abierto, significa que el bloqueo del recorrido de la aguja ha funcionado de forma incorrecta y se recomienda comunicarse con el técnico de servicio de GE Medical Systems.

G.E. Sistemas Médicos de Argentina S.A.
Marcelo Garófalo
Apoderado

Ing. Eduardo Domingo Fernández
Director Técnico



Prueba de control de calidad 2 - Precisión de localización - Enfoque vertical


Frecuencia: Cada día que se realicen los exámenes de estereotaxia mediante el enfoque vertical, antes del primer examen del día. Si no se realizan exámenes de estereotaxia, la prueba se debe efectuar al menos una vez al mes para preservar la precisión. Consulte el Capítulo 7 *Guía de descripción de los procedimientos*, sección 3 *Comprobación previa al examen* en la página 44.

Objetivo: Garantizar la precisión de localización en el enfoque vertical

Equipo: Maniquí de enfoque lateral L19 y aguja de calibración L20.

Condiciones de la prueba: La magnitud de la desviación de cualquier eje (X, Y o Z) no debe ser mayor de 1 mm.

Anote la finalización de la prueba en la sección *Formulario 2. Precisión de localización de estereotaxia - Enfoque vertical* en la página 201.

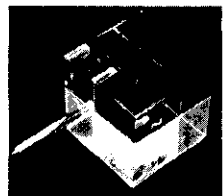

Maniquí de enfoque lateral

Prueba de control de calidad 3 - Comprobación de la precisión antes de usar agujas CB o VAD nuevas en el enfoque vertical.

Frecuencia: Siempre que se define una nueva aguja CB o VAD o cuando se va a utilizar un nuevo lote de agujas.


En el caso de agujas utilizadas sin un dispositivo de biopsia, (FNA o gancho), realice el procedimiento descrito en la sección *Prueba de control de calidad 4 - Comprobación de la precisión antes de usar agujas FNA nuevas en el enfoque vertical*, page 185.

Objetivo: Garantizar la precisión de localización en el enfoque vertical

Equipo: Maniquí de enfoque lateral y la nueva aguja CG o VAD que vaya a utilizarse.

Condiciones de la prueba: Durante la comprobación, se registra la magnitud de las desviaciones de los ejes (X, Y y Z). El objetivo debe estar dentro de la parte central de la muesca de la aguja.

Anote la finalización de la prueba en la sección *Formulario 2. Precisión de localización de estereotaxia - Enfoque vertical* en la página 201.

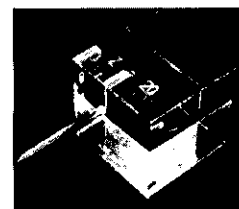

Maniquí de enfoque lateral

Prueba de control de calidad 4 - Comprobación de la precisión antes de usar agujas FNA nuevas en el enfoque vertical.

Frecuencia: Siempre que se define una nueva aguja FNA o cuando se va a utilizar un nuevo lote de agujas FNA.

En el caso de agujas utilizadas con un dispositivo de biopsia, (CB o VAD), realice el procedimiento descrito en la sección *Prueba de control de calidad 3 - Comprobación de la precisión antes de usar agujas CB o VAD nuevas en el enfoque vertical*, page 181.



Objetivo: Garantizar la precisión de localización en el enfoque vertical

Equipo: Maniquí de enfoque vertical y aguja FNA nueva.

Nota:

La aguja debe ser lo suficientemente larga para tocar el fondo del orificio más profundo del maniquí. Se recomienda utilizar una aguja de al menos 94-95 mm de longitud cuando el maniquí está comprimido en 50 mm.

- El maniquí es un bloque de dimensiones 50 x 100 x 72 mm (aproximadamente 2 x 4 x 3 pulgadas).
- Para efectuar las pruebas de precisión, se proporcionan cinco orificios de 1 mm de diámetro y de diferentes profundidades. Los orificios se distribuyen de la forma que se muestra en el diagrama. Las profundidades son las siguientes:

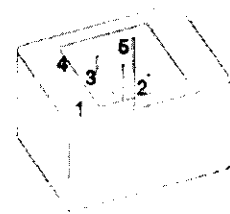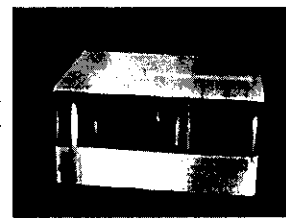

Referencia	1	2	2	4	5
Profundidad (mm)	10	40	30	20	45



Condiciones de la prueba: La magnitud de la desviación de cualquier eje (X, Y o Z) no debe ser mayor de 1 mm.


Anote la finalización de la prueba en la sección *Formulario 2. Precisión de localización de estereotaxia - Enfoque vertical* en la página 201.

G.E. Sistemas Médicos de Argentina S.A.
 Marcelo Garófalo
 Apoderado



Ing. Eduardo Domingo Fernández
 Director Técnico

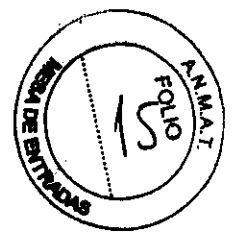

Prueba de control de calidad 5 - Precisión de localización - Enfoque lateral

Frecuencia: Cada día que se realicen los exámenes de estereotaxia mediante el enfoque lateral, antes del primer examen del día y siempre que se defina una aguja nueva. Si no se realizan exámenes de estereotaxia, la prueba se debe efectuar al menos una vez al mes para preservar la precisión. Consulte el Capítulo 7 *Guía de descripción de los procedimientos*, sección 3 *Comprobación previa al examen en la página 44*.

Objetivo: Garantizar la precisión de localización en el enfoque lateral

Equipo: Maniquí de enfoque lateral L19 y aguja de calibración L20.

Condiciones de la prueba: La magnitud de la desviación del eje X o Y o Z no debe superar +/-1,0 mm con la aguja de calibración.

Anote la finalización de la prueba en la sección *Formulario 3. Precisión de localización de estereotaxia - Enfoque lateral en la página 202*.

3.5. La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico;

Entorno de instalación

Independientemente de los requisitos de instalación especificados por el fabricante con el fin de cumplir con las normas legales, un experto cualificado debe llevar a cabo un control adicional de la protección contra la radiación, con arreglo a las normativas vigentes. Este control de la protección debe repetirse tras cada cambio realizado en el equipo, en la carga de trabajo o en las condiciones de funcionamiento que pueda aumentar significativamente la probabilidad de que las personas reciban más radiación que la del equivalente de la dosis máxima permisible.

El sistema no está diseñado para ser utilizado en presencia de anestésicos explosivos. La falta de atención a esta advertencia puede provocar un incendio o una explosión.

3.6. La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos;

No Aplica.

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización;

No Aplica.

3.8. Si un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones.

No Aplica.

G.E. Sistemas Médicos de Argentina S.A.
Marcelo Garófalo
Acreditado

Ing. Eduardo Domingo Fernández
Director Técnico



En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la Sección I (Requisitos Generales) del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

No Aplica.

3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros);

PREPARACIÓN

El Mamógrafo se enciende y utiliza de la manera usual como se describe en el Manual de Operador del Senographe Essential Stereotaxy

Por medida de seguridad, el sistema de compresión está provisto de un freno magnético que evita la caída del compresor en caso de corte de la alimentación de la red. Si este corte se produce durante un examen, podría quedar una fuerza de aproximadamente 5 daN sobre el compresor. Para liberar a la paciente se debe levantar suavemente el compresor para compensar esta fuerza.

Si no se ha colocado el compresor, deje libre el espacio entre la parte inferior del brazo de compresor y la parte superior del soporte portachasis.


COLOCACIÓN DEL PACIENTE

Antes de empezar la mamografía, compruebe los siguientes puntos:

_ Antes de colocar a la paciente, proceda a una evaluación visual de la zona mamaria para determinar los factores que pueden influir en o estar influidos negativamente por la colocación correcta de la mama para la mamografía, por ejemplo: verrugas, cicatrices, piel lesionada. En el caso de pacientes con mamas grandes, la transpiración en esta zona puede ablandar la piel, que se vuelve más delgada.

- Para colocar la mama correctamente en posición CC para una mamografía, es primordial alejarla de la pared torácica y empujarla suavemente hacia delante para visualizar la mayor cantidad posible de tejido mamario. Es necesario levantar y tirar para obtener una colocación correcta, pero ésto puede desgarrar levemente la piel lesionada y provocar sangrado.

- Se debe informar previamente a la paciente de la importancia de la colocación correcta de la mama y de la posibilidad de que se produzca un pequeño desgarro o un leve sangrado.
- _ Utilice técnicas apropiadas para la colocación de pacientes con implantes mamarios.
- _ GEMS no se responsabiliza de las lesiones a la paciente ocasionadas por el uso de dispositivos de calentamiento externos al sistema.

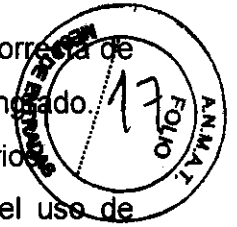

3.10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser descripta;

Las instrucciones de utilización deberán incluir además información que permita al personal médico informar al paciente sobre las contraindicaciones y las precauciones que deban tomarse. Esta información hará referencia particularmente a:

3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico;


Botones de DESCONEJÓN de emergencia del sistema

El suministro eléctrico del sistema completo se interrumpe en caso de que se produzca un incendio, una inundación, un terremoto o una emergencia de otro tipo. Al pulsar el botón de **desconexión del sistema en caso de emergencia**, se interrumpe de forma inmediata el suministro eléctrico del sistema directamente desde el control de desconexión principal (MDC). No obstante, esta acción puede dañar archivos del sistema o se pueden perder datos del paciente, ya que el sistema no dispone de tiempo para guardar datos o cerrarse de modo ordenado.

La persona encargada del diseño estructural de las instalaciones determina el número de botones de desconexión en caso de emergencia que deben existir así como las ubicaciones de los mismos. GE recomienda colocar uno de estos botones cerca de la puerta de entrada de cada sala en las instalaciones de exploración y del sistema. Solicite a su supervisor que le muestre la ubicación dentro de la suite del sistema de los botones de desconexión del sistema en caso de emergencia. Siga las instrucciones de su centro para informar de una emergencia.

G.E. Sistema Médicos de Argentina S.A.
Marcelo Garófalo
Apoderado

Ing. Eduardo Domingo Fernández
Director Técnico

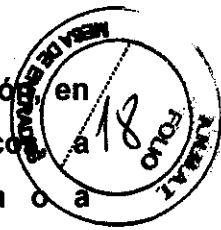

3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras;

ADVERTENCIA: El uso incorrecto de los equipos de rayos X puede causar lesiones. Lea detenidamente las instrucciones de este manual antes de utilizar este aparato. Si no cumple las reglas de seguridad básicas contra los rayos X o no tiene en cuenta las advertencias de este manual, corre el riesgo de exponerse a sí mismo y a su paciente a radiaciones peligrosas.

Usuarios autorizados

Este equipo incorpora un alto nivel de protección contra los rayos X distintos del haz útil. No obstante, el equipo no exime al usuario de su obligación de adoptar las medidas de precaución adecuadas para evitar su exposición o la de otras personas a la radiación por falta de atención, descuido o ignorancia.

Toda persona en contacto con equipos de rayos X debe recibir una formación adecuada y seguir las recomendaciones del Consejo nacional sobre mediciones y protección de radiaciones de la Comisión Internacional de Protección de las Radiaciones.

ADVERTENCIA: Toda persona en contacto con equipos de rayos X debe adoptar las medidas adecuadas para protegerse contra posibles lesiones.

Todas las personas autorizadas a utilizar el equipo deben conocer y comprender los riesgos que se corren ante la exposición a rayos X con el fin de que eviten cualquier daño o lesión derivados de la exposición. GE Medical Systems recomienda firmemente el uso de materiales y dispositivos de protección contra los daños y lesiones que puede provocar la exposición a rayos X.

Uso en presencia de gases inflamables


El sistema Senographe DS no debe ser usado en presencia de gases inflamables

ANOTACIONES DE IMAGENES

- El equipo incluye una función llamada ANOTACIONES DE IMAGENES (IMAGE ANNOTATIONS), la cual permite al médico archivar información del paciente.

G.E. Sistemas Médicos de Argentina S.A.
Marcelo Garófalo
Apoderado

Ing. Eduardo Domingo Fernández
Director Técnico

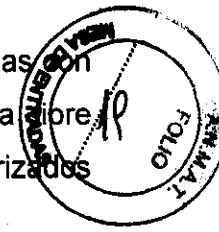

- Tome en cuenta que la Directiva Europea concerniente a "la protección de personas con respecto al manejo de información relacionada a sus vidas privadas y a la libre circulación de dicha información" le requiere a los usuarios de archivos computarizados (radiólogos, médicos) no archivar información relacionada a:

- raza,
- opiniones filosóficas,
- opiniones religiosas,
- opiniones políticas,
- etc.

Energía de radio frecuencia

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia. El equipo puede causar interferencia de radio frecuencia a otros aparatos médicos y no médicos y a aparatos de radio comunicación.

Para suministrar una protección razonable contra dicha interferencia, este producto cumple con el límite de emisiones para el Grupo 1, Directiva de Aparatos Médicos Clase A, tal y como se menciona en EN60601-1-2. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia alguna en una instalación en particular.

Sí el equipo causa interferencia (lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo), el usuario (personal de servicio calificado) debe intentar corregir el problema poniendo en práctica una o más de las siguientes acciones:

- reoriente o reubique el aparato (s) afectado (s)
- aumente la separación entre el equipo y el aparato afectado
- alimente al equipo desde un contacto diferente al del aparato afectado
- consulte al punto de compra o al representante de servicio para mas sugerencias

El fabricante no es responsable por ninguna interferencia causada por el uso de cables de interconexión diferentes a los recomendados o por cambios o modificaciones no autorizadas al equipo. Los cambios o modificaciones no autorizados pueden causar la cancelación de la autorización al usuario para operar el equipo.

Para cumplir con las regulaciones acerca de interferencia electromagnética para Aparatos FCC Clase A, todos los cables de interconexión a aparatos periféricos deben ser protegidos

G.E. Sistemas Médicos de Argentina S.A.
 Marcelo Garófalo
 Apoderado

Ing. Eduardo Domingo Fernández
 Director Técnico

y debidamente puestos a tierra. El uso de cables que no estén debidamente protegidos o debidamente aterrizados puede ser causa de interferencia en radio frecuencia lo cual es una violación a las regulaciones de FCC.



No use aparatos que intencionalmente transmitan señales RF (Teléfonos celulares, radio transmisores, o productos controlados por radio) cerca del equipo ya que puede causar que su desempeño no sea lo publicado en las especificaciones. Apague este tipo de equipos cuando se encuentren cerca del equipo GE.

El personal médico a cargo del equipo es responsable de ordenar a los técnicos, pacientes u otras personas que pueden estar cerca del equipo a que cumplan completamente con el requerimiento anterior.

3.13. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico de que trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar;

No Aplica

3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación;

Reciclaie:

Maquinas o accesorios al término de su vida útil:

La eliminación de maquinas y accesorios debe estar de acuerdo con las regulaciones nacionales para el procesamiento de desperdicios.

Todos los materiales y componentes que pongan en riesgo el medio ambiente deben ser removidos al término de la vida útil de las maquinas y accesorios (ejemplos: baterías celulares, secas o mojadas, aceite transformador, etc.).

Por favor consulte a su representante local de GE Sistemas Médicos antes de desechar estos productos.

Materiales de empaque:

Los materiales utilizados para empacar nuestros equipos son reciclables. Deben ser recolectados y procesados de acuerdo con los reglamentos en vigor en el país donde las maquinas o accesorios son desempacados.

G.E. Sistemas Médicos de Argentina S.A.
Marcelo Garófalo
Apoderado

Ing. Eduardo Domingo Fernández
Director Técnico

3.15. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo, conforme al ítem 7.3. del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

No Aplica



3.16. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición.

No Aplica


G.E. Sistemas Médicos de Argentina S.A.
Marcelo Garófalo
Apoderado


Ing. Eduardo Domingo Fernández
Director Técnico





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2010 - "AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
REVOLUCION DE MAYO"

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-7844/10-3

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **7868**, y de acuerdo a lo solicitado por GE SISTEMAS MEDICOS DE ARGENTINA S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMAS RADIOGRAFICOS DIGITALES PARA MAMOGRAFIA
Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-432 - Sistemas Radiográficos, Digitales, para Mamografía

Marca: General Electric

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: Sistema mamográfico que permite localizar lesiones de mama en tres dimensiones con el accesorio estereotáxico.

Modelo/s: SENOGRAPHE ESSENTIAL STEREOTAXY.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS SCS

Lugar/es de elaboración: 283 RUE DE LA MINIERE BP 34, BUC, CEDEX, Francia.

Se extiende a GE SISTEMAS MEDICOS DE ARGENTINA S.A. el Certificado PM-1407-121, en la Ciudad de Buenos Aires, a **03 DIC 2010**....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº **7868**

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.