



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° -13902

BUENOS AIRES, 21 DIC 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-4019-16-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma VOXEL ARGENTINA S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1374-27, denominado: Sistema de digitalización de placas radiográficas odontológicas, marca DURR DENTAL AG.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1374-27, denominado: Sistema de digitalización de placas radiográficas odontológicas, marca DURR DENTAL AG.

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° — 13902

ARTÍCULO 2º.- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1374-27.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizadas, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-4019-16-5

DISPOSICIÓN N°

sao

13902


Dr. ROBERTO LERMA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° 13902 a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1374-27 y de acuerdo a lo solicitado por la firma VOXEL ARGENTINA S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Sistema de digitalización de placas radiográficas odontológicas.

Marca: DURR DENTAL AG

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 6874/13.

Tramitado por expediente N° 1-47-0-5551/13-3.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Modelo/s	VistaScan Combi Plus VistaScan Ceph Plus VistaScan Net VistaScan Perio VistaScan Perio Net VistaScan Perio Plus VistaScan Mini VistaScan Mini Plus VistaScan Mini Easy	VistaScan Combi Plus VistaScan Combi View VistaScan Perio VistaScan Perio Net VistaScan Perio Plus VistaScan Mini VistaScan Mini Plus VistaScan Mini Easy VistaScan Mini View
Rótulos	Aprobado por Disposición ANMAT N° 6874/13.	A fs. 6.
Instrucciones de Uso	Aprobado por Disposición ANMAT N° 6874/13.	A fs. 20 a 36.

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

E
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma VOXEL ARGENTINA S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1374-27, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días.....**21 DIC 2016**


Expediente N° 1-47-3110-4019-16-5

DISPOSICIÓN N°

13902


Dr. ROBERTO LEIDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

43902

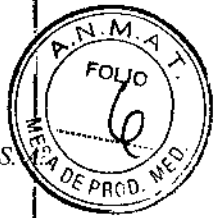


Sistema de Digitalización de Placas radiográficas Durr VISTA SCAN

VOXEL ARGENTINA S.A.


Proyecto de Rotulo: Sistema de Digitalización de Placas radiográficas Odontológicas Durr VISTA SCAN Combi Plus/ Combi View/ Perio/ Perio Net/ Perio Plus/ Mini/ Mini Plus/ Mini Easy/ Mini View

21 DIC 2016

Fabricado por: Dürr Dental AG
 Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Alemania.
 Importado por:



EQUIPAMIENTOS MÉDICOS
 VOXEL ARGENTINA S.A.
 Charlone 624 - Capital Federal - Argentina
 Sistema de Digitalización de placas radiográficas odontológicas
Marca: DÜRR Dental AG
Modelo: VistaScan
Numero de serie: xxxxxxxx
Fecha de Fabricación: xx/xx/xxxx
EQV XXXX




Las instrucciones especiales para la operación y/o uso de este dispositivo se encuentran detalladas en el manual del usuario.
 Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.
Director Técnico: Ing. Martín Turjanski - Mat.n° 4840
 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM - 1374-27

Modelos:

VISTA SCAN Combi Plus/ Combi View/ Perio/ Perio Net/ Perio Plus/ Mini/ Mini Plus/ Mini Easy/ Mini View


VOXEL ARGENTINA S.A.

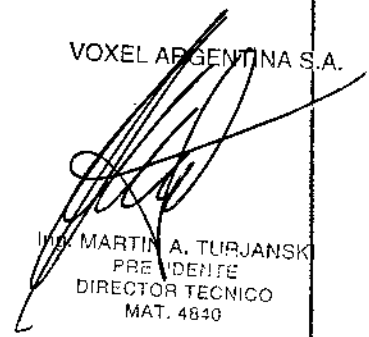

ING. MARTÍN A. TURJANSKI
 PRESIDENTE
 DIRECTOR TÉCNICO
 MAT. 4840

F

3902

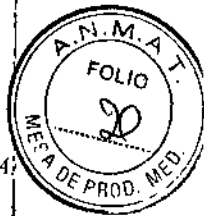


Sistema de Digitalización de Placas radiográficas Durr VISTA SCAN

VOXEL ARGENTINA S. A.

Instrucciones de Uso: Sistema de Digitalización de Placas radiográficas Odontológicas Durr VISTA SCAN Combi Plus/ Combi View/ Perio/ Perio Net/ Perio Plus/ Mini/ Mini Plus/ Mini Easy/ Mini View

SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE PLACAS RADIOGRAFICAS ODONTOLOGICAS DURR VISTA SCAN

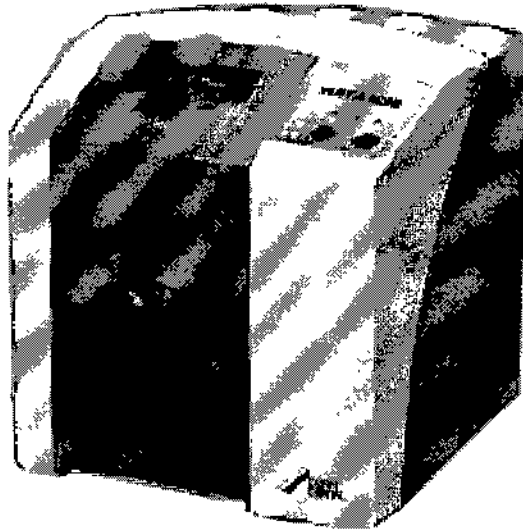


DATOS DEL ROTULO DE LOS SISTEMAS DE DIGITALIZACION DE PLACAS RADIOGRAFICAS ODONTOLOGICAS DURR VISTA SCAN

El rotulo incluye entre otros datos la siguiente información:


Fabricado por: Dürr Dental AG
Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Alemania.

Importado por:


 **voxel**
argentina

EQUIPAMIENTOS MÉDICOS

VOXEL ARGENTINA S.A.
Charlone 624 - Capital Federal - Argentina
Sistema de Digitalización de placas radiográficas odontológicas
Marca: DÜRR Dental AG
Modelo: XXX
EQV XXXX


 Las instrucciones especiales para la operación y/o uso de este dispositivo se encuentran detalladas en el manual del usuario.
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.
Director Técnico: Ing. Martin Turjanski - Mat. n° 4840
AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM - 1374-27

VOXEL ARGENTINA S.A.


ING. MARTIN A. TURJANSKI
PRESIDENTE
DIRECTOR TÉCNICO
MAT. 4840


9

43902

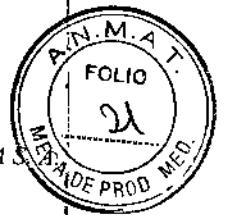

Sistema de Digitalización de Placas radiográficas Durr VISTA SCAN

VOXEL ARGENTINA S.A.

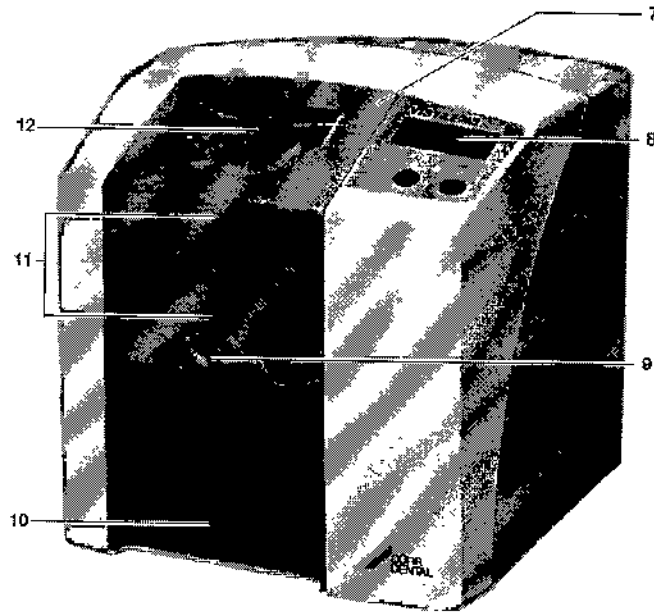

Vista Scan Mini


Partes Principales

1) Placa radiográfica



La placa radiográfica encuentra aplicación como medio de toma de radiografías para la radiación de rayos X y para el almacenamiento de los datos de la radiografía o imagen.

2) Funda protectora de la luz

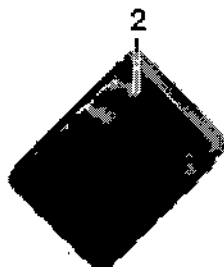


VOXEL ARGENTINA S.A.

Ing. MARTIN A. TURJANSKI
PRESIDENTE
DIRECTOR TÉCNICO
MAT. 4840

- Protege al paciente de una infección por placas radiográficas contaminadas.

- Evita que se produzcan daños mecánicos en la placa radiográfica al colocarla en la boca del paciente.
- Protege la placa radiográfica de contaminaciones y ensuciamiento.
- Evita un borrado de los datos de las radiografías en la placa radiográfica

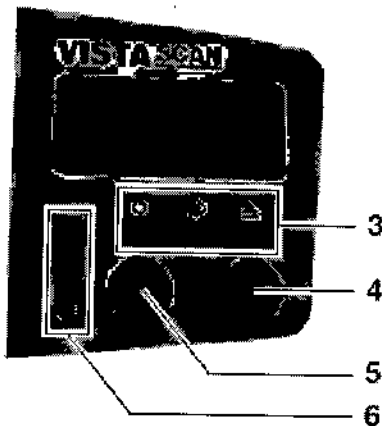

3) Diodos LED indicadores del modo de servicio

Se indican informaciones generales sobre el estado de servicio del aparato.

- Diodo luminiscente LED verde: Se indica la disposición de servicio
- Diodo luminiscente LED azul: Se indica el estado de comunicación
- Diodo luminiscente LED amarillo: Se indica el estado del modo de limpieza

4) Tecla de Limpieza

Pulsando esta tecla, el aparato se desplaza a la posición de limpieza o retorna de la posición de limpieza a la posición de servicio.

5) Tecla de Conexión/Desconexión

Para la conexión: Pulsar la tecla de Conexión / Desconexión.

Para la desconexión: Mantener pulsada durante 2 segundos la tecla de Conexión / Desconexión.

Se inicia la interrupción normal del funcionamiento del aparato, los LEDs de color verde y azul parpadean alternativamente.

Desconexión forzada: Mantener pulsada la tecla de Conexión / Desconexión hasta que se hayan apagado todos los diodos LED.

6) LEDs de estado

Se indica información sobre el estado del transporte de placas.

Diodo luminiscente LED rojo: Fallo / Error

Diodo luminiscente LED amarillo: Transporte de placas ocupado

Diodo luminiscente LED verde: Se puede introducir la placa radiográfica

7) Cubierta


Con ésta se cubren las piezas móviles de la unidad de entrada. Puede ser retirada para la realización de trabajos de limpieza y desinfección.

8) Display

En el display se visualizan, en función del software empleado, las diversas informaciones sobre el estado del aparato como, por ejemplo, en combinación con el programa DBSWIN el nombre del paciente, la sala o estancia y el número de diente.

VOXEL ARGENTINA S.A.

ING. MARTIN A. TURJANSKI
PRESIDENTE
DIRECTOR TÉCNICO
MAT. 4840

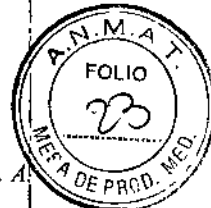

9) Botón de desenganche

Con éste se desengancha la cubierta para abrir.

10) Bandeja de salida

Las placas radiográficas caen en la bandeja de salida desmontable después de su lectura y borrado.


11) Unidad de transporte de placas, en el interior

En el interior del aparato, la placa radiográfica en la unidad de transporte de placas pasa por las unidades de lectura y de borrado.

12) Unidad de entrada


En la unidad de entrada, la placa radiográfica, que se encuentra empaquetada en la funda protectora de la luz abierta, es colocada, fijada y pasada a la unidad de transporte de placas.

13) Caja de almacenamiento con bandeja para placas

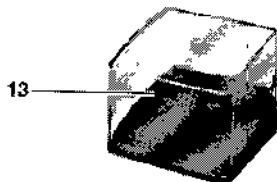

Después de retirar las placas radiográficas de la bandeja de salida, éstas pueden ser depositadas en la caja de almacenamiento.

14. Casetes de placas (para el caso de VistaScan Perio/ Combi Plus/ Combi View)

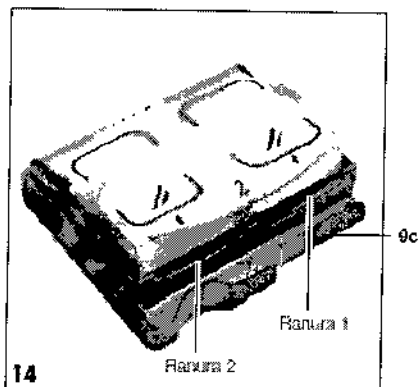

- Estando aplicada la cubierta del casete (9c) éste evita el borrado de datos de la radiografía en la placa radiográfica.
- La placa radiográfica se coloca con el casete de placas en una de las unidades de entrada.
- Con ayuda del casete de placas se pasa la placa radiográfica a la ranura de transporte del VistaScan.
- En función del tipo de casete de placas, se pueden alojar varias placas radiográficas.


VOXEL ARGENTINA S.A.

Ing. MARTIN A. TURJANSKI
PRESIDENTE
DIRECTOR TÉCNICO

Instrucciones de uso

El modelo Mini View posee adicionalmente pantalla táctil.

Elementos de manejo

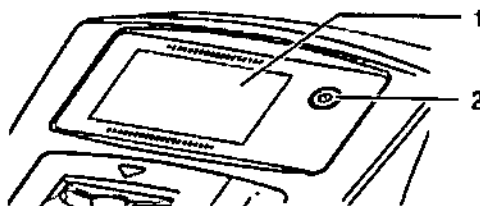

- 1 Pantalla táctil
- 2 Mantenga pulsada durante

El aparato puede manejarse con la pantalla táctil cuando no esté conectado a un ordenador. Los datos pueden introducirse en la pantalla táctil con las yemas de los dedos o con el estilete.

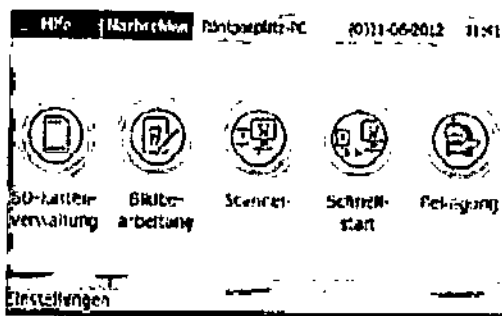
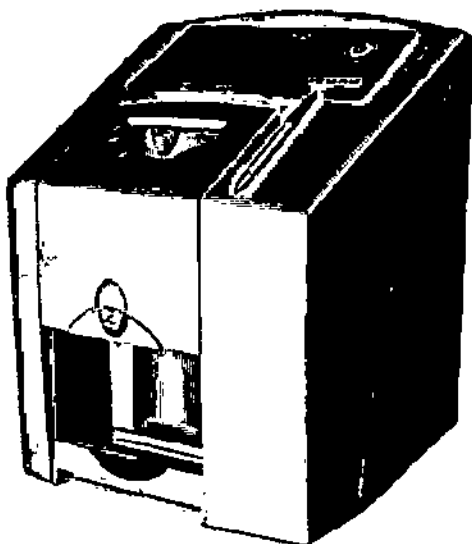


Figura 1: Pantalla de arranque de la pantalla táctil



Con el botón Ayuda se abrirá una página de ayuda para cada página. Con el botón Mensajes se pueden consultar los mensajes presentes en ese momento.

Vista Scan Mini View

VOXEL ARGENTINA S.A.

Ing. MARTIN A. TURJANSKI
PRESIDENTE
DIRECTOR TECNICO
MAT. 4840


3902

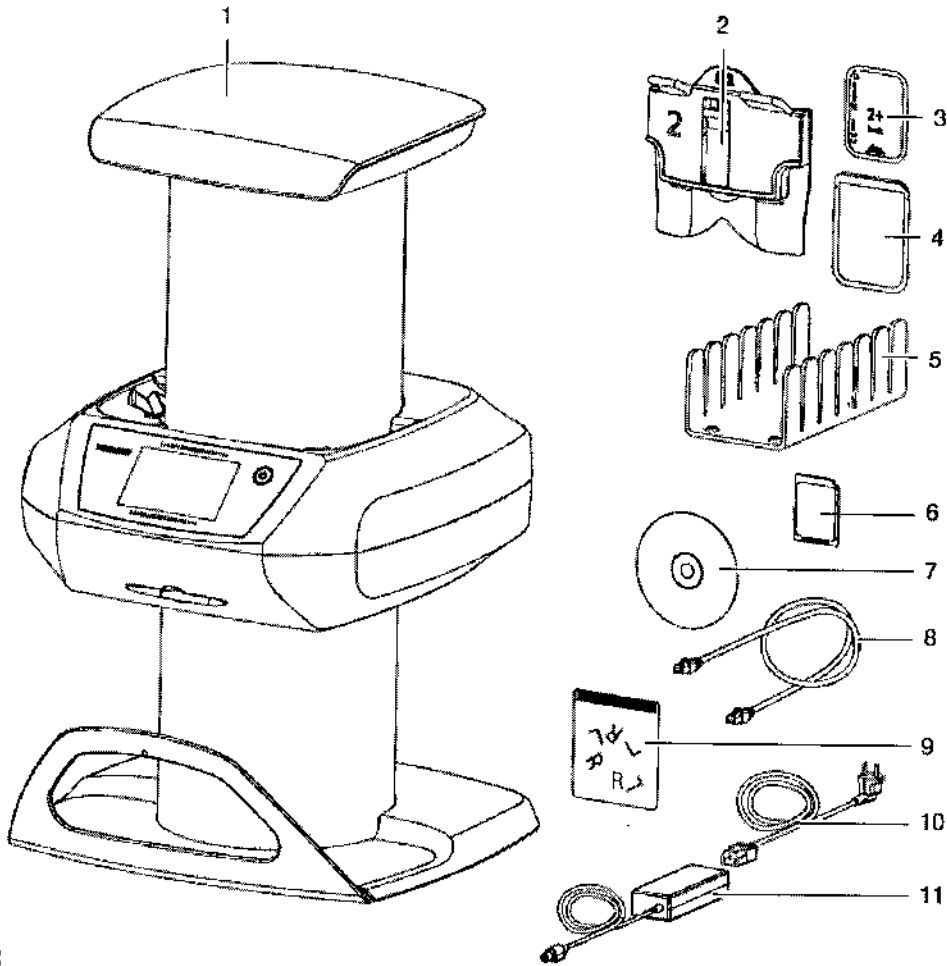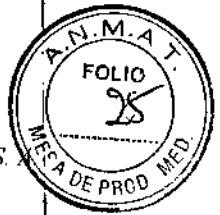

Combi View

- 1 Imagen del escáner
- 2 Casete intraoral
- 3 Imagen placa intraoral
- 4 Protección intraoral
- 5 Bandeja de casetes intraoral
- 6 Tarjetas de memoria SDHC
- 7 DBSWIN software de imagen de DVD
- 8 Cable de Red
- 9 Letras de plomo
- 10 Cable de red
- 11 Unidad de alimentación

VOXEL ARGENTINA S.A.


 Ing. MARTÍN A. TURJANSKI
 RESIDENTE
 DIRECTOR TÉCNICO
 MAT. 4840

Descripción del funcionamiento

Los equipos VistaScan convierten en una radiografía digital los datos de imagen almacenados en la placa radiográfica intraoral. Seguidamente, esta radiografía puede ser observada y procesada a través del sistema de ordenador PC conectado.

Radiografiado

La placa radiográfica intraoral se inserta en la funda protectora, se realiza su desinfección, se coloca en la boca del paciente se somete a la exposición. Después de la exposición se desinfecta de nuevo la funda de protección de la luz.

Lectura de los datos de imagen o radiografía

Pulsando el pulsador de Conexión / Desconexión se conecta el VistaScan. Seguidamente se activa el modo de lectura por medio de un software para la toma de radiografías, por ejemplo, el DBSWIN a partir de la versión 5. Cuando se enciende el diodo de estado LED de color verde, esto significa que se puede colocar centrada la placa radiográfica, con la funda protectora de la luz rasgada, en la Unidad de entrada.

Seguidamente la placa radiográfica es desplazada con los dedos desde la funda protectora de la luz fijada hasta la Unidad de transporte de placas. La funda protectora de la luz continúa fijada a la unidad de entrada. Una vez eliminada la fijación de la funda protectora de la luz, ésta puede ser retirada.


Dentro de la unidad de transporte de placas se realiza el desplazamiento de la placa radiográfica por la unidad de lectura. Allí se realiza la exploración por láser de los datos de imagen de la placa radiográfica, siendo transferidos después al ordenador PC. El progreso de la exploración de imágenes se puede controlar por una ventana en el monitor.

Una vez concluida la exploración, la placa radiográfica es pasada por la unidad de borrado, donde se realiza el borrado de los datos de imagen restantes. En el paso siguiente, la placa radiográfica se deposita en la bandeja de salida.

Para hacer más radiografías

Después de haber retirado las placas radiográficas de la bandeja de salida, se recomienda meter de nuevo la placa radiográfica en una funda protectora de la luz. La placa radiográfica así empaquetada se puede depositar en la bandeja para placas.

Si se tratan con el debido cuidado, las placas radiográficas pueden ser empleadas varios centenares de veces. Sin embargo, antes de una nueva utilización se deberá comprobar si la placa radiográfica tiene algún daño o si está sucia. Las placas radiográficas digitales dañadas no se deben emplear de nuevo.

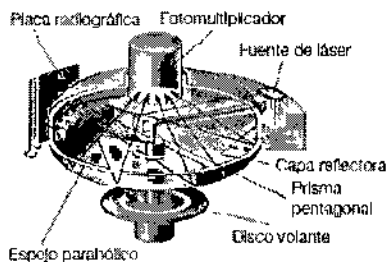

VOXEL ARGENTINA S.A.

Ing. MARTIN A. TURJANSKI
PRESIDENTE
DIRECTOR TÉCNICO
MAT. 4840

Puesta en servicio

La instalación y la configuración del aparato solamente debe ser llevada a cabo por un técnico capacitado y formado del Departamento de Servicio Técnico - Representante local autorizado de Durr Dental AG.

**15) Conexión de 24 V**

La conexión de 24 V encuentra aplicación para la alimentación de corriente del VistaScan.

16) Botón de Reset

Pulsando y manteniendo pulsado el botón de reset durante 15 - 20 segundos durante la conexión, se reajustan todos los ajustes de red del aparato, estableciendo de nuevo los ajustes realizados en fábrica. La operación de reset o restauración se confirma en el VistaScan por medio de la indicación o mensaje "Factory Reset".

17) Conexión AUX

La conexión AUX encuentra aplicación como interfaz de diagnóstico para el técnico del servicio de asistencia. A través de la conexión AUX se pueden conectar aparatos o equipos adicionales para el test, control y búsqueda de fallos y averías.

18) LED's de estado de la conexión de red

Los LED's de estado de la conexión de red indican si se ha establecido un enlace con una red o si se está realizando una transferencia de datos.

19) Conexión de red


El VistaScan puede ser operado integrado en una red.

20) Conexión de puerto USB

El VistaScan puede ser operado a través de un puerto USB.

Placas radiográficas dentales

Las placas radiográficas son tóxicas: Por ello, en la boca del paciente, éstas se tienen que emplear siempre metidas dentro de una funda de protección de la luz. Si se diera el caso de que un paciente se traga la placa radiográfica o partes de la misma, se deberá consultar inmediatamente un médico especialista para que extraiga la placa radiográfica. Si el paciente daña la funda de protección de la luz mordiendo, éste se deberá enjuagar la boca empleando mucha agua.

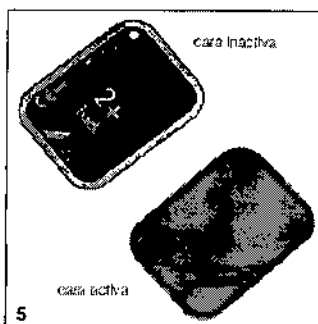

La exposición de las placas radiográficas se tiene que realizar siempre por la cara activa:

- La cara activa tiene un color azul claro. Esta cara o parte está marcada con un símbolo como ayuda de posicionamiento.

VOXEL ARGENTINA S.A.


Ing. MARILYN A. TURJANSKI
PRESIDENTE
DIRECTOR TÉCNICO
MAT. 4840

• La cara inactiva tiene un color negro. En ella se encuentra impreso el tamaño y los datos del fabricante y "back". Asimismo, la cara inactiva está enmarcada con un borde plateado, el cual simplifica el posicionamiento con la funda protectora de luz en la boca del paciente. En una de las esquinas se encuentra impreso un punto plateado, el cual sustituye la protuberancia que había antes en las películas radiográficas convencionales. Al realizar el posicionamiento, este punto debiera estar siempre orientado hacia el plano oclusal. De este modo se simplifica la orientación sobre la radiografía.

Manipulación de las placas radiográficas


Examinar las placas radiográficas por si tienen algún daño visible. Las placas radiográficas dañadas (p.ej. que tienen rota una capa de protección, o que tengan un rayado visible, que puedan afectar el resultado del diagnóstico) tienen que ser cambiadas.

- Las placas radiográficas son tan flexibles como una película radiográfica.
- No doblarlas ni someterlas a presiones.
- No rayarlas ni ensuciarlas.
- No someterlas a tratamientos en autoclave

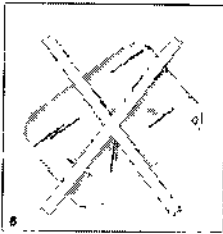

Almacenamiento y conservación de placas radiográficas digitales:

- Las placas radiográficas se tienen que guardar y almacenar en un lugar oscuro.
- No guardarlas ni almacenarlas en lugares calientes o húmedos.
- Guardar las placas radiográficas intraorales dentro de una funda de protección de la luz que tenga unas dimensiones adecuadas.
- Cuando la placa radiográfica se guarde o almacene durante más de 24 horas, ésta tiene que ser borrada de nuevo antes de proceder a la toma de radiografías. Ver el capítulo 19.5
- Protegerlas de una radiación directa por los rayos del sol, así como de una radiación ultravioleta.
- Cuando las placas vayan a ser guardadas en la sala de toma de radiografías, éstas tienen que ser protegidas de una exposición previa por rayos X.

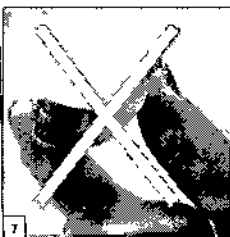


Fundas de protección de la luz

- Protegen al paciente de una infección por placas radiográficas contaminadas.
- Protegen la placa radiográfica de contaminaciones y ensuciamiento.
- Protegen la placa radiográfica de la luz.
- Se pueden adquirir, como en el caso de la placa radiográfica, en varios tamaños. Elegir el tamaño apropiado.

VOXEL ARGENTINA S.A.


VOXEL ARGENTINA S.A.

La funda de protección de la luz es un artículo de un solo uso, por lo que no se debe usar de nuevo.

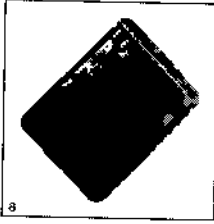

Protección de mordida


La protección de mordida es una medida de protección para la placa radiográfica para evitar daños al morder muy fuerte el paciente durante la toma de radiografías.

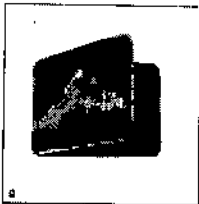

Caperuza de protección


La caperuza de protección protege el VistaScan contra la suciedad y el polvo en el caso de tiempos de inactividad relativamente largos.

- Pasar la caperuza de protección sobre el aparato con la marca amarilla orientada hacia delante hasta que ésta cubra totalmente el aparato.
- Guardar la caperuza de protección en un lugar limpio cuando no sea usada.

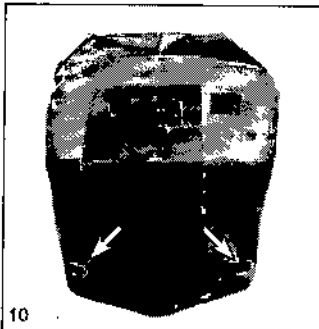

Caja de almacenamiento con bandeja para placas

Después de retirar las placas radiográficas de la bandeja de salida, éstas pueden ser depositadas en la caja de almacenamiento. Antes del empleo se tiene que colocar la bandeja para placas en la caja de almacenamiento.

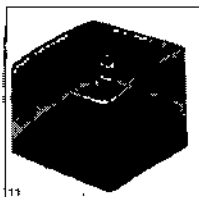

VOXEL ARGENTINA S.A.

Ing. MARTIN A. TURJANSKI
PRESIDENTE
DIRECTOR TECNICO
MAT. 4840



Preparaciones para la obtención de radiografías

Cuando las placas vayan a ser utilizadas por primera vez o cuando hayan sido guardadas o almacenadas durante más de 24 horas, éstas se deberán borrar antes de su uso.

Borrado de datos de radiografía:

- Introduzca la placa radiográfica borrada completamente en la funda de protección de la luz. Se tiene que poder ver la cara negra (inactiva) de la placa radiográfica.
- Desprenda las cintas adhesivas blancas y cierre fijamente la abertura de la funda de protección de la luz presionando correspondientemente.

La funda de protección de la luz es un artículo de un solo uso, por lo que no se debe usar de nuevo.

- La funda de protección de la luz se tiene que desinfectar con un paño desinfectante directamente antes de ser colocada en la boca del paciente. Como alternativa, en lugar de un paño desinfectante, se puede emplear un agente de desinfección por rociado.

Obtención de placas radiográficas

Las placas radiográficas tienen inscrito un símbolo. El símbolo es visible en la radiografía, simplificando así la orientación durante el diagnóstico.



La placa radiográfica se tiene que colocar en la boca del paciente de manera que el símbolo no afecte la capacidad de diagnóstico de la radiografía.

Procediendo como de costumbre, colocar la placa radiográfica en su funda de protección de la luz en la boca del paciente. El punto plateado en la cara inactiva debe indicar hacia el plano oclusal. La cara activa de la placa radiográfica tiene que indicar hacia el tubo radiográfico.

Ajustar el tiempo de exposición y los valores de ajuste en el aparato de rayos X.

Hacer la radiografía.

Los datos de la radiografía en la placa radiográfica tienen que ser leídos a más tardar dentro de 30 minutos después de su creación.

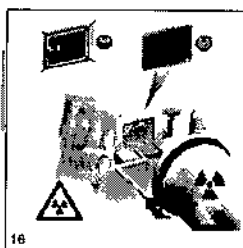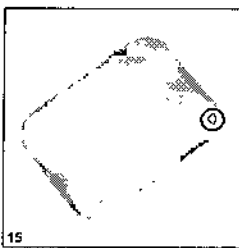

VOXEL ARGENTINA S.A.

Preparaciones para la lectura de los datos de la radiografía

Es imprescindible llevar puestos guantes de protección al retirar las placas radiográficas de la boca del paciente.

- Retirar de la boca del paciente la placa radiográfica en su funda de protección de la luz.
- En el caso de un intenso ensuciamiento de la funda de protección de la luz y de los guantes, p.ej. por sangre, se tiene que realizar, antes de la desinfección, una limpieza basta en seco, por ejemplo, frotando con un paño de celulosa limpio.
- La funda de protección de la luz y los guantes se tienen que limpiar y desinfectar con un paño desinfectante. Como alternativa, se puede realizar una desinfección por rociado.
- Colocar la placa radiográfica, aún en su funda de protección de la luz, en el paño desinfectante.

- Quitarse los guantes de protección, desinfectarse



Lectura de los datos de imagen o radiografía

- Conectar el PC y el monitor.
- Conectar el VistaScan por medio de la tecla de Conexión / Desconexión
- Tras la conexión se tiene que realizar la iniciación del aparato.

Diodos LEDs de servicio

		Dispuesto para el servicio
		No dispuesto para la comunicación
		Posición de limpieza
		La cubierta o la unidad de entrada no están correctamente montados
		Proceso de desconexión

Conexión Desconexión Parpadeo

LED de estado ranura de transporta

	Fallo o avería
	Placa radiográfica en procesamiento
	Unidad de entrada en disposición de servicio
	El deflector pasa del Modo Standby al número de revoluciones nominal

Conexión Desconexión Parpadeo

Ejemplo en el software de procesamiento de imágenes o radiografías DBSWIN

Una información detallada sobre la radiografía, toma de radiografías, almacenamiento y procesamiento es facilitada por el manual DBSWIN en el menú [Ayuda], [Índice].

- Iniciar el programa DBSWIN.
- Seleccionar el paciente correspondiente.
- Seleccione en el módulo de X-ray los valores de exposición.
- Ajuste la resolución deseada.
- Haga clic sobre el botón de "Lectura" de inserción.

VOXEL ARGENTINA S.A.

Ing. MARTIN A. TURJANSKI
 PRESIDENTE
 DIRECTOR TÉCNICO
 MAT. 4840

Las radiografías son asignadas siempre consecutivamente al paciente que está activado en el software. Con el fin de evitar confusiones entre las radiografías de los diversos pacientes, solamente deben leerse radiografías del paciente activado.

Los diodos luminiscentes de servicio y estado se encienden de color verde:

Si el VistaScan es iniciado desde el modo standby, el diodo LED de estado de color verde parpadea. Tan pronto como el aparato se encuentre en el estado de disposición de servicio se enciende de verde el LED indicador del estado.



- Abrir en línea recta la funda protectora de la luz, a saber, a lo largo del borde de adhesión (recorte en V).

Los datos de imagen grabados en la placa radiográfica se borran al ser alcanzados por rayos de luz. Las placas radiográficas que ya han sido sometidas a una exposición no se deben manipular nunca sin la funda protectora de la luz.

- Colocar la funda protectora de la luz con la placa radiográfica centrada y orientada en línea recta (la parte rasgada de la funda protectora de la luz mira hacia abajo y la parte inactiva hacia el usuario) en la Unidad de entrada.

La unidad de fijación se desplaza automáticamente hacia delante y fija la funda protectora de la luz con la placa radiográfica.

- Introducir la placa radiográfica hacia abajo en el aparato desde la funda protectora de la luz, a saber, hasta que la placa radiográfica sea arrastrada automáticamente hacia dentro. La funda protectora de la luz es retenida por la unidad de fijación y no es arrastrada al interior del aparato. El avance del proceso de lectura se representa en la ventana de previsualización del monitor.

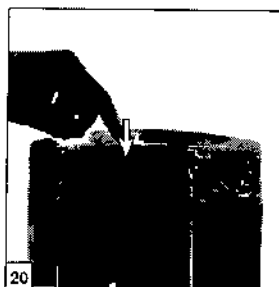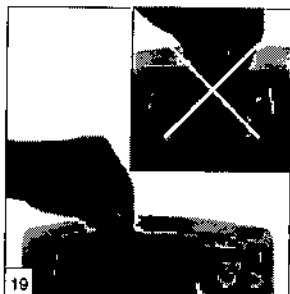

El LED de estado se enciende de amarilla:


- No introducir ninguna otra placa radiográfica más.
- Una vez terminado el proceso de lectura, la unidad de fijación se desplaza automáticamente hacia atrás. Retirar ahora la funda protectora de la luz vacía. El LED de estado cambia el de amarillo a verde.
- Guardar la radiografía en el DBSWIN.
- Ahora se puede introducir por lectura una nueva placa radiográfica o se desconecta el aparato por medio de la tecla de Conexión / Desconexión.

Pulsando la Tecla de Conexión / Desconexión durante 3 segundos, se inicia la parada o desactivación del aparato.

Esta operación puede durar un momento

Tan pronto como concluya la desactivación del aparato, éste se apaga por completo. El aparato no debe ser movido durante este tiempo.

VOXEL ARGENTINA S.A.

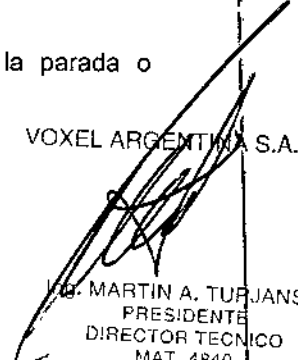
G. MARTIN A. TURJANSKI
PRESIDENTE
DIRECTOR TÉCNICO
MAT. 4840

Instrucciones de Uso



Borrado de los datos de imagen o radiografía

Después de la lectura, la placa radiográfica es conducida automáticamente por la unidad de borrado. Allí se borran los datos de la radiografía en la placa radiográfica. En el paso siguiente, la placa radiográfica se deposita en la bandeja de salida.

Modo especial de "borrado"


La placa radiográfica se tiene que borrar de nuevo, cuando:

- La placa radiográfica ha sido guardada durante más de 24 horas.
- Los datos de imagen en la placa radiográfica no han sido borrados a causa de un fallo en el VistaScan (mensaje de error/fallo en el software).

Con el modo especial solamente se activa la unidad de borrado en el Vista- Scan. No se realiza ninguna transferencia de datos de imagen al software.

Para borrar de nuevo:

- Seleccionar el modo especial de "borrado" en el software.
- Colocar la funda protectora de la luz abierta con la placa radiográfica en la Unidad de entrada.
- Introducir la placa radiográfica hacia abajo en el aparato desde la funda protectora de la luz, a saber, hasta que la placa radiográfica sea arrastrada automáticamente hacia dentro.

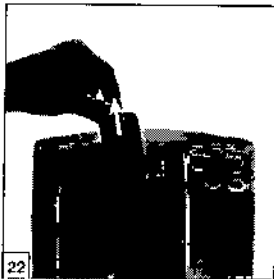

Desinfección y limpieza

Solamente deben emplearse preparados detergentes y desinfectantes autorizados por Dürr Dental. Otros productos detergentes y desinfectantes pueden producir daños en el VistaScan y en los accesorios.

Fundas de protección de la luz


- La funda de protección de la luz se tiene que desinfectar con un paño desinfectante antes y después de ser colocada en la boca del paciente. Como alternativa, en lugar de un paño desinfectante, se puede emplear un agente de desinfección por rociado aplicado sobre un paño suave y exento de hilachas. Se tiene que tener en cuenta el tiempo de acción y reacción. Todos los líquidos se tienen secar totalmente.

Placas radiográficas digitales

No someter las placas radiográficas a un tratamiento en autoclave. Una desinfección por inmersión en baño desinfectante trae consigo una destrucción de las placas radiográficas.

Recomendamos emplear los paños de limpieza para placas radiográficas.

- En caso de un ensuciamiento se deberán limpiar ambas caras de la placa antes de un nuevo uso, empleando para ello un paño suave exento de hilachas. La suciedad restante puede ser eliminada con ayuda de un detergente especial incluido en el set o juego de limpieza, frotando circular y cuidadosamente para ello.
- La placa radiográfica tiene que estar completamente seca antes de que se pueda usar de nuevo.

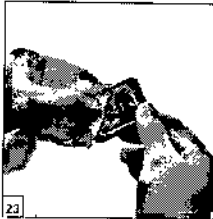

Superficie del aparato

La superficie del aparato tiene que ser limpiada y desinfectada en el caso de una contaminación o de un ensuciamiento visible.

Limpiar la superficie del VistaScan empleando un paño humedecido, y desinfectarla con un paño desinfectante.

- Antes de iniciar el proceso de lectura se tiene que eliminar la suciedad eventualmente existente en las zonas de entrada y salida.

Unidad de entrada

La unidad de entrada tiene que ser limpiada y desinfectada en el caso de una contaminación o de un ensuciamiento visible.

- Pulsar la tecla de limpieza. La unidad de fijación se desplaza a una posición central. El diodo LED amarillo se enciende. En el display del VistaScan se visualiza "CLEANING POSITION".
- Accionar el botón de desbloqueo y, al mismo tiempo, retirar la cubierta hacia arriba.
- Retirar hacia arriba la unidad de fijación.

Daños en el VistaScan

Ninguna de las piezas del VistaScan debe ser desinfectada con un desinfectador térmico ni ser sometida a un tratamiento desinfectante en autoclave. ¡En caso dado, el calor destruiría las piezas plásticas!



Limpiar las piezas interiores empleando un paño humedecido, y desinfectarla con un paño desinfectante.

Tanto la cubierta como la unidad de fijación pueden ser desinfectadas mediante un desinfectante para instrumentos. Alojarse la unidad de fijación. Aplicar la cubierta. Accionar la tecla de limpieza. La unidad de fijación retorna a la posición original. El diodo LED 27 verde se enciende.

VOXEL ARGENTINA S.A.

Ing. MARTÍN A. TURJANSKI
PRESIDENTE
DIRECTOR TÉCNICO
MAT. 4840

Instrucciones de Uso

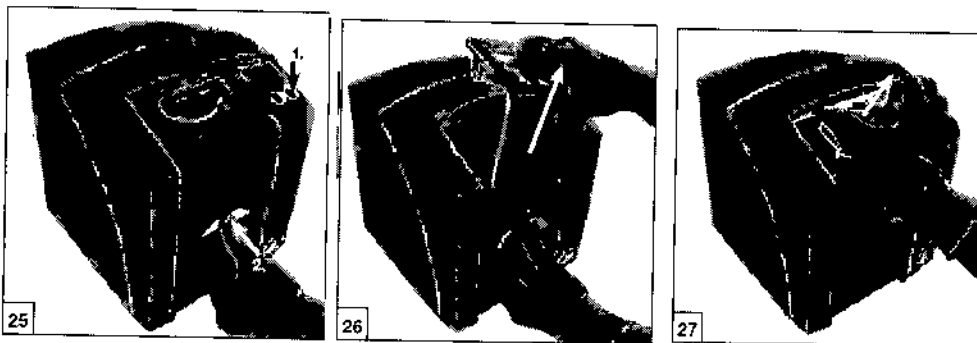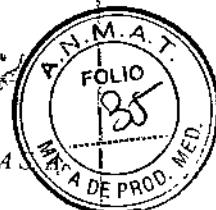

Mantenimiento

Tras un periodo de de como máximo 3 años se deberá llevar a cabo un servicio de mantenimiento de todo el aparato, a saber, por un técnico capacitado del Departamento de Servicio Técnico - Representante local autorizado de Durr Dental AG.

Precauciones de seguridad

Instrucciones generales de seguridad

- Durante la operación del aparato se tienen que observar las leyes y disposiciones vigentes. No está permitido realizar transformaciones, cambios o modificaciones en el aparato.
- La instalación tiene que ser llevada a cabo por un técnico capacitado y formado del Departamento de Servicio Técnico - Representante local autorizado de Durr Dental AG.
- Antes de todo uso, el usuario se tiene que convencer de la seguridad de funcionamiento del aparato y, asimismo, tiene que verificar el estado perfecto del mismo.
- El usuario tiene que estar familiarizado con el servicio y manejo del aparato.
- El producto no está previsto para un funcionamiento o uso en áreas en las que exista peligro de explosión o una atmosfera comburente, respectivamente. Zonas con peligro de explosión pueden resultar debido al empleo de agentes anestésicos, sustancias para el cuidado de la piel, oxígeno y desinfectantes para la piel inflamables.

Instrucciones de seguridad para la protección contra la corriente eléctrica


- El aparato solamente se debe conectar a una caja de conexión con toma a tierra correctamente instalada.
- Antes de proceder a la conexión del aparato se tiene que verificar si la tensión de red y la frecuencia de red indicadas sobre el aparato coinciden con los valores de la red de distribución eléctrica local.
- Antes de la puesta en servicio se tienen que examinar el aparato y los cables en cuanto a posibles daños. Los cables y dispositivos de enchufe dañados tienen que ser renovados inmediatamente.
- Evitar siempre un contacto simultáneo con el paciente y con conexiones de enchufe del aparato descubiertas.



- Al realizar trabajos en el aparato se deberán tener en cuenta las reglamentaciones y disposiciones en razón de la seguridad correspondientes para instalaciones eléctricas.

Precauciones de eliminación y disposición final del Producto

Esta etiqueta indica que, cuando el equipo se tenga que desechar, no se debe descartar con los demás desechos domésticos, sino que deberá tratarse responsablemente de tal manera de proteger la salud humana y el medio ambiente. Contáctese con el fabricante o distribuidor para mayores detalles de cómo reciclar el equipo.

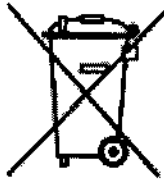

VOXEL ARGENTINA S.A.

Ing. MARTINA A. TURJANSKI
PRESIDENTE
DIRECTOR TECNICO
MAT. 4840

Instrucciones de Uso