



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 14028

BUENOS AIRES, 23 DIC 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-6050-16-3 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1407-210, denominado: SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADA, marca GENERAL ELECTRIC.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1407-210, denominado: SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADA, marca GENERAL ELECTRIC.

E 1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN Nº = 14028

ARTÍCULO 2º.- Aceptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1407-210.

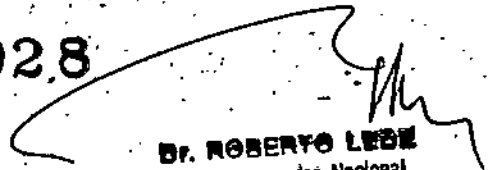
ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-3110-6050-16-3

DISPOSICIÓN Nº

fe

- 14028


DR. ROBERTO LEBE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **14028** los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1407-210 y de acuerdo a lo solicitado por la firma GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADA.

Marca: GENERAL ELECTRIC.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N°8266/15.

Tramitado por expediente N° 1-47-3110-721-15-1.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Fabricante	1-GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd. 2-GE Healthcare Japan Corporation.	Fabricante nro. 1: GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd. Fabricante nro. 2: -GE Healthcare Japan Corporation.
Lugar/es de Elaboración	1- No 1 Yong Chang North Rd. Beijing Economic & Technological Development Zone, Beijing, 100176, China. 2- 7-127, Asahigaoka 4-Chome, HINOSHI, Tokio, Japón, 191-8503.	Fabricante nro. 1: West Area of Bulding N° 3, N° 1 Yongchang North Road Beijing Economic and Technological Development Area Beijing, Beijing China, 100176. Fabricante nro. 2: 7-127, Asahigaoka, 4-chome,

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

		Hino-shi, Tokyo, 191-8503, Japon.
Rótulos	Aprobado por Disposición ANMAT N° 8266/15.	A fs. 7.
Instrucciones de Uso	Aprobado por Disposición ANMAT N° 8266/15.	A fs. 9 a 106.

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1407-210, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **23 DIC 2016**.

Expediente N° 1-47-3110-6050-16-3

DISPOSICIÓN N°

-14028

Dr. ROBERTO LEBE
Subadministrador Nacional
ANMAT



14028

PROYECTO DE ROTULO
Anexo III.B – Disposición ANMAT N° 2318/02 (t.o. 2004)

Optima CT540
Sistema de Tomografía Computada

23 DIC 2016

Fabricantes:

- **GE Hangwei Medical Systems CO., LTD.**. West Area of Building N° 3, N° 1 Yongchang North Road Beijing Economic and Technological Development Area Beijing, Beijing China, 100176
- **GE Healthcare Japan Corporation.** 7-127, Asahigaoka 4-chome, HINO-SHI, Tokyo, Japon, 191-8503

Importador: G.E. HEALTHCARE ARGENTINA S.A. Echeverria 1262/1264, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Optima CT540

Sistema de Tomografía Computada

Volts: 200//240V 380//480V,3

Frecuencia: 50/60HZ

Número de Serie: xxxxxx

Fecha de fabricación.: mm-aaaa

RADIACIÓN LÁSER

NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ

Este aparato de rayos X puede ser peligroso tanto para el paciente como el operador si no se observan los factores de exposición segura, las instrucciones de uso y los programas de mantenimiento. Para ser usado únicamente por personal autorizado



Director Técnico: Ing. Eduardo Fernández – Matrícula N° 5363 COPITEC

Autorizado por la ANMAT PM 1407-210

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

M. M. Miducci
Gerada
Argentina S.A.

MARCELO GIBROFALO
DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



4028

Instrucciones de uso
Disposición ANMAT N° 2318/02 (to 2004)
Optima CT540
Sistema de Tomografía Computada

Fabricantes

Fabricante: GE Hangwei Medical Systems CO., LTD. West Area of Building N° 3, N° 1 Yongchang North Road Beijing Economic and Technological Development Area Beijing, Beijing China, 100176

GE Healthcare Japan Corporation. 7-127, Asahigaoka 4-chome, HINO-SHI, Tokyo, Japon, 191-8503

Importador: G.E. HEALTHCARE ARGENTINA S.A. Echeverria 1262/1264, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Optima CT540

Director Técnico: Ing. Eduardo Fernández – Matrícula N° 5363 COPITEC

Autorizado por la ANMAT PM 1407-210

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Sistema de Tomografía Computada

Componentes del sistema:

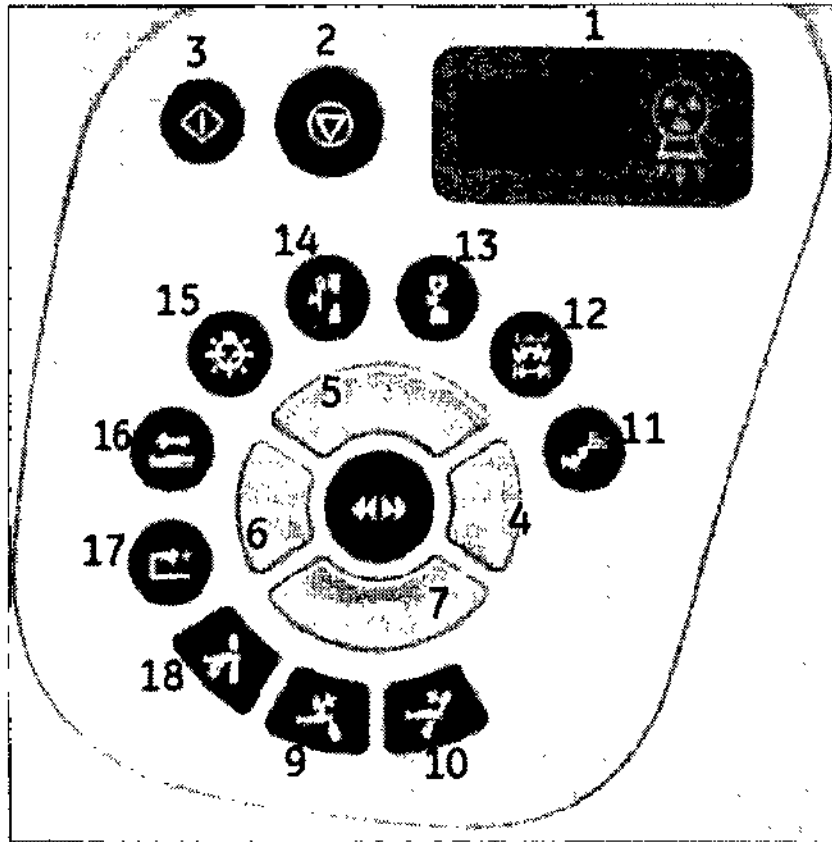
Componentes del hardware

E.

Micucci
N.º de inscripción
Argentina S.A.
GE Healthcare

[Signature]
ROSAURO BAROFALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

= 4028







Controles del estativo

Nº	Icono	Función	Descripción
1		Prep Delay Timer (Temporizador de la demora de preparación)	Muestra la demora de la preparación antes de que comience la exploración.
2		Stop Scan (Detener la exploración)	Cuando se presiona, se detienen las pantallas de preparación y la exposición a los rayos X, se apagan las luces de alineación del láser y se detienen todos los movimientos de la mesa y del estativo. La camilla y la base también se liberan y deben bloquearse de nuevo antes de iniciar la exploración.

E.



Micucci
Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
GE HEALTHCARE

N°	Icono	Función	Descripción
9		Inferior Gantry Tilt (Inclinación inferior del estativo)	Al presionar Inclinación inferior del estativo, el mismo se inclinará hacia los pies del paciente, independientemente de su posición. NOTA: Se debe establecer un punto de referencia para que se sepa la posición del paciente.
10		Superior Gantry Tilt (Inclinación superior del estativo)	Al presionar Inclinación superior del estativo, el mismo se inclinará hacia la cabeza del paciente, independientemente de su posición. NOTA: La inclinación máxima depende de la altura de la mesa y de la interacción con la matriz de interferencia. Utilice el botón de límite de desplazamiento de la mesa y de la inclinación para determinar los límites. El botón de Inclinación remota en el módulo de interfaz de control de la exploración (Remote Tilt button on the Scan Control Interface Module) se puede utilizar para que el estativo vuelva a cero una vez que se hayan adquirido todas las exploraciones prescritas para el examen.
11		Demostración de las luces relacionadas con la respiración	Presionarlas le permite demostrarle al paciente cómo utilizar las luces de respiración y el temporizador de cuenta regresiva. <ul style="list-style-type: none"> • Una luz verde intermitente le indica que se prepare para contener la respiración. • Una luz amarilla le indica que debe mantener la respiración. • El indicador de cuenta regresiva cuenta las segundos que le quedan de respiración. • Una luz verde inmóvil indica que el paciente debe reanudar la respiración.
12		Límites de desplazamiento de la inclinación y de la mesa	Presionarlo le permite ver el rango de inclinación en curso del estativo y el rango explorable, en base a la posición de la mesa, en el panel de visualización del estativo. NOTA: Los límites de la inclinación y del desplazamiento de la mesa que se muestran se calculan en base al límite y a la matriz de colisión que tiene en cuenta la altura de la mesa y la ubicación de la marca de referencia en la camilla cuando proporcionan la información que se muestra.


E
N.º 1000 - Micucci
S.º 1000 - S.º 1000
GE Healthcare Argentina S.A.

[Firma]
MESA DE PROD. MED.
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

N°	Icono	Función	Descripción
13		<p>Internal Landmark (Punto de referencia interno)</p>	<p>Presionar el punto de referencia interno establece el punto de referencia de la mesa cuando se coloca al paciente, utilizando la luz láser interna de alineación. Se trata, por lo general, del punto de referencia anatómico que ha de utilizarse al acostar al paciente. Por ejemplo, si el punto de referencia anatómico del paciente es la hendidura del esternón, debe centrarlo en la luz de alineación láser interna y pulsar (Internal Landmark). La pantalla del estativo debe entonces mostrar una ubicación de la mesa de 0 mm. La razón para esta ubicación de 0 mm de la mesa es porque el sistema calcula los números de ubicación de la mesa en base a la luz láser interna de alineación. Debe utilizar ya sea (Internal Landmark) o (External Landmark) antes de hacer clic en [Confirm](Confirmar).</p>
14		<p>External Landmark (Punto de referencia externa)</p>	<p>Presionar el punto de referencia externo establece el punto de referencia de la mesa cuando se coloca al paciente, utilizando la luz láser externa de alineación. Se trata, por lo general, del punto de referencia anatómico que ha de utilizarse al acostar al paciente. Por ejemplo, si el punto de referencia anatómico del paciente es la escotadura esternal, debe centrarlo en la luz de alineación láser externa y luego presionar (External Landmark). La pantalla del estativo indica una posición de mesa de unos 240 mm, según las características de la mesa. Estos números de ubicación son el resultado del cálculo que el sistema realiza de la ubicación de la mesa en función de la distancia entre las luces de alineación de láser externa e interna. Debe utilizar ya sea (Internal Landmark) o (External Landmark) antes de hacer clic en [Confirm](Confirmar).</p> <p>NOTA: El sistema que tiene luces láser de alineamiento externo fijas en la sala de exploración puede configurarse para utilizar la posición de estas luces de alineamiento como ubicación del punto de referencia. Si está configurado para utilizar las luces de alineación del láser interno, la posición del punto de referencia externo refleja la distancia que existe desde estas luces hasta el isocentro.</p> <p>Las luces láser externas fijadas en el estativo aparecerán en el paciente aunque el sistema esté configurado para utilizar las luces de alineación láser montadas en el exterior en la sala para la ubicación del marcado externo.</p> <p>Para el sistema, sólo es posible configurar una luz de alineación externa como la distancia del marcado externo. Esto forma parte del proceso de instalación del sistema. Consulte a su representante local del servicio para definir la mejor configuración para su centro.</p>

E
 María Miucci
 Gerente
 GE Healthcare Argentina S.A.

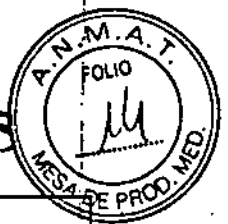[Signature]
 ANDRÉS ROFALO
 CO-DIRECTOR TÉCNICO
 GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



N°	Icono	Función	Descripción
15		Luz de alineación del láser	Un botón de dos posiciones que, al presionarse, sirve para encender o apagar todas las luces de alineación del láser. Estas se utilizan para ayudar a establecer las ubicaciones de los puntos de referencia. NOTA: El interruptor de luces de alineación del láser se proporciona como un atenuador del haz alternativo.
16		Cradle Lock/Release (Liberación/ Bloqueo de la parte superior de la camilla)	Pulse (Cradle Lock)(Bloqueo de camilla) una vez para desbloquear la camilla de la mesa y convertirla en "flotante". En otras palabras, puede moverla libremente con las manos. Esto resulta de gran utilidad para sacar al paciente del estativo en caso de emergencia. Pulse (Cradle Lock) por segunda vez para bloquear de nuevo la camilla y mantener el centrado definido. NOTA: Si se utiliza el bloqueo de la camilla durante una adquisición SmartStep, la camilla debe estar bloqueada para realizar la exposición.
17		Indicador/ Restablecimiento del sensor anticollisión de la mesa	(Reset)(Reiniciar) se utiliza si se ha presionado (Emergency Stop)(Interruptor de emergencia); (Reset)(Reinicia) parpadea aproximadamente una vez cada dos segundos. Presione (Reset) para volver a accionar la mesa y el estativo. ♦ Si se ha apagado la alimentación del estativo, el botón Reset (Reinicio) debe presionarse para restaurar todas las comunicaciones hacia el estativo y la consola. NOTA: Si el movimiento de la mesa se interrumpe, retire el obstáculo y continúe desplazando la mesa.
18		Inicio	Presione simultáneamente (Home)(Inicio) para sacar la camilla del estativo y volver a poner la inclinación del estativo a cero grados. Una vez alejada la camilla del estativo, la mesa desciende hasta alcanzar el nivel más bajo permitida.

Pantalla del estativo

La pantalla del estativo (Figura 5-2) proporciona información sobre el estado del estativo y de la mesa. Los números que se muestran encima y debajo de cada indicador o del área de estado de la cifra de la pantalla del estativo se corresponden con los números de la Tabla.

Micucci
Gerada
GE Healthcare Argentina S.A.

Garofalo
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Figura 5-2 Indicadores de pantalla del estativo



Botones de control









Nº	Icono	Función	Descripción
1		Indicador de colisión	La luz de colisión se enciende cuando hay una posibilidad de que la mesa, la camilla y el estativo entren en contacto entre sí. Existen sensores de colisión de inclinación/elevación en las cubiertas delantera y trasera de la parte superior de la apertura del estativo. Los sensores de colisión están activos durante la elevación de la mesa y durante la inclinación del estativo. La luz también se enciende si hay diez libras de resistencia durante el desplazamiento de la camilla hacia dentro o hacia fuera o cuando el desplazamiento de la mesa, de la camilla o del estativo llega a su límite. En caso de interferencias, puede que necesite subir o bajar la mesa, comprobar la inclinación del estativo o determinar si la resistencia se está produciendo debido a restricciones del paciente, accesorios o si son causadas por el paciente. Si necesita inclinar el estativo después de que se haya detectado una colisión, el estativo sólo se inclina en incrementos de 0.5. También puede comprobar el botón Table collision sensor indicator/reset (Indicador/Restablecimiento del sensor anticolisión de la mesa) en la parte delantera del estativo. La luz se apagará si continúa pulsando el botón.
2		Indicador de desbloqueo de camilla	El indicador de desbloqueo de la camilla se ilumina, indicando que la camilla está desbloqueada. Cuando la camilla está desbloqueada, se convierte en "flotante".

Maria Micucci
 Gerente
 GE Healthcare Argentina S.A.


[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 COORDINADOR TÉCNICO
 GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.







-14028



3		Indicador de luz de láser	<p>El (Laser Light Indicator)(Indicador de luz de láser) se ilumina cuando la luz de alineación de láser está encendida. Normalmente, esta luz sólo se enciende cuando se está colocando al paciente.</p> <p> CUIDADO: Para garantizar la seguridad del paciente, éste ha de permanecer con los ojos cerrados mientras la luz de alineación láser esté encendida.</p>
4		Indicador de pulmones	El indicador pulmonar se activa cuando el sistema captura una señal de sincronización respiratoria.
5		Indicador del corazón	El corazón se ilumina siempre que se produzca una señal de sincronización de impulsos del ECG detectada por el sistema.
6		Indicador de altura vertical	El indicador de altura vertical muestra la altura vertical de la mesa con respecto al isocentro.
7		Indicador de posición horizontal de camilla	La posición horizontal de la camilla mostrada es la posición de la camilla basada en la referencia anatómica del paciente establecida. Esta referencia se establece utilizando los puntos de referencia interno y externo. Una S precede al número si la posición es superior al punto de referencia, o una I si es inferior al mismo.
8		Indicador de inclinación del estativo	<p>El indicador de inclinación del estativo muestra una de dos pantallas. La normal muestra la angulación actual del estativo. Si ésta es superior, el número va precedido de una S, y si es inferior, de una I. Este se extiende durante Prescripto.</p> <p>El botón de Inclinación prescripto en el Módulo de la interfaz de control de exploración parpadea.</p>
9		Nombre del paciente	<p>El nombre del paciente se muestra cuando se ingresa en la pantalla de información del paciente. El sistema muestra automáticamente 2 líneas cuando el nombre es largo.</p> <p>NOTA: El tamaño de la fuente se cambia automáticamente por el número de caracteres.</p>

M. Micucci
 GE Healthcare Argentina S.A.


 ROBERTO GAROFALO
 COORDINADOR TÉCNICO
 GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

10		Identificación del paciente	El ID del paciente se muestra cuando se ingresa en la pantalla de información del paciente. NOTA: El tamaño de la fuente se cambia automáticamente por el número de caracteres.
11		Edad y género	La edad y el género se muestran cuando se ingresa en la pantalla de información del paciente. Pantalla de información. Si el paciente es menor a un año, se mostrará la edad 0. NOTA: El tamaño de la fuente se cambia automáticamente por el número de caracteres.
12		Descripción del examen	La descripción del examen se muestra cuando se ingresa en la pantalla de información del paciente. Pantalla de información. NOTA: Se puede seleccionar mostrar/ocultar la información del paciente (elementos que tienen un *) durante un examen. Si no desea mostrarlos en todos los exámenes, los ingenieros de campo de GE pueden configurarlo de esa manera. Contacte el servicio GE para cambiar la selección. NOTA: El tamaño de la fuente se cambia automáticamente por el número de caracteres.
13		Botones de posicionamiento del paciente por defecto	Estos botones definen la ubicación cuando la camilla se detiene con un pedal de ajuste. Los ingenieros de campo de GE pueden ajustar la ubicación.
14		Botón de herramientas	Hay varias funciones relacionadas con la configuración de la pantalla LCD.
15		Botón de cine.	Hay algunas películas que pueden ayudarle a explicar los procedimientos del examen CT a los pacientes.

M. Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.


MARCELO GAROFALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

14028



Luz de contención de la respiración


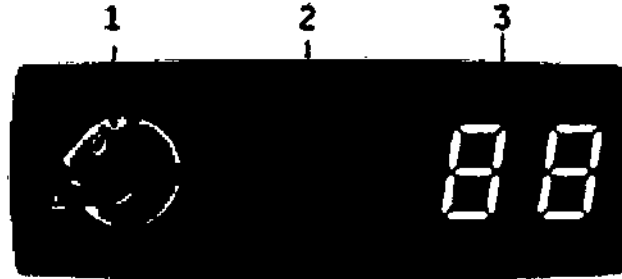
Figura 5-3 Luz de contención de la respiración.



Nº	Descripción
1	Luz de respiración
2	Luz de apnea
3	Tiempo de apnea transcurrido en segundos.

Componentes del estativo interno

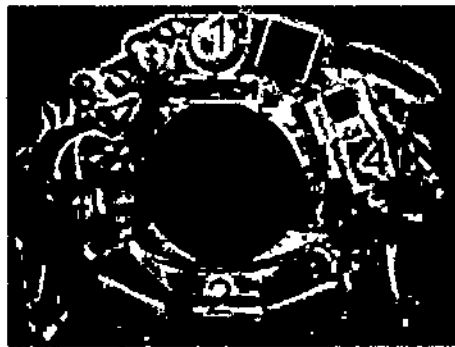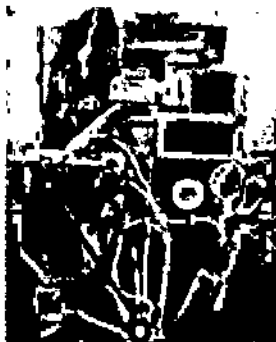Figura 5-4 Estativo de la Optima CT540



Optima CT540
Vista lateral del estativo

Optima CT540
Vista delantera del estativo

Los números de la imagen anterior corresponden a las definiciones numeradas que se presentan a continuación. Tabla 5-4.

Tabla 5-4 Descripción de los componentes internos

E.

Marcelo Garofalo
Mievesti
Escada
GE Healthcare - Argentina S.A.

Marcelo Garofalo
MARCELO GAROFALO
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
DIRECTOR TECNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

	Pieza	Función
1	Tubo y colimador	<ul style="list-style-type: none"> Optima CT540 Series: La capacidad de calentamiento del ánodo con un tubo Performix es de 6,3 millones de unidades caloríficas (MHU) y la tasa de enfriamiento es de 840.000 unidades caloríficas por minuto (840 KHU/min).
2	Detector/Sistema de adquisición de datos	El detector está compuesto de un material centelleante sólido conocida como HiLight. Los detectores HiLight proporcionan un 98% de eficacia de la dosis.
3	Controlador del tubo.	El controlador del tubo regula los tiempos de inicio y parada del rotor del tubo.
4	Generador	Para la Optima CT540 Series: <ul style="list-style-type: none"> El ánodo y el cátodo juntos proporcionan un máximo de 53.2 kilovatios (KV) de potencia.
5	ORP	El ORP proporciona el punto central de comunicación para el subsistema de rotación.
6	Interfaces del estativo y de la consola	Si su sistema tiene conexiones para los accesorios aprobados por GE, las figuras y las tablas siguientes le mostrarán cómo y dónde conectar los accesorios aprobados (la lista de accesorios aprobados es encuentra en el capítulo <u>Seguridad</u>). NOTA: El monitor cardíaco y el respiratorio tienen conexiones tanto para el estativo como para la consola.

Interfaces del estativo y de la consola

Si su sistema tiene conexiones para los accesorios aprobados por GE, las figuras y las tablas siguientes le mostrarán cómo y dónde conectar los accesorios aprobados (Consulte la lista Accesorios aprobados por GE que se encuentra más adelante).

NOTA: El monitor cardíaco y el respiratorio tienen conexiones tanto para el estativo como para la consola.

Mario Micucci

 Gerente


 GE Healthcare Argentina S.A.

EXPERTO MARCELO

 CONSULTOR TECNICO


 GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

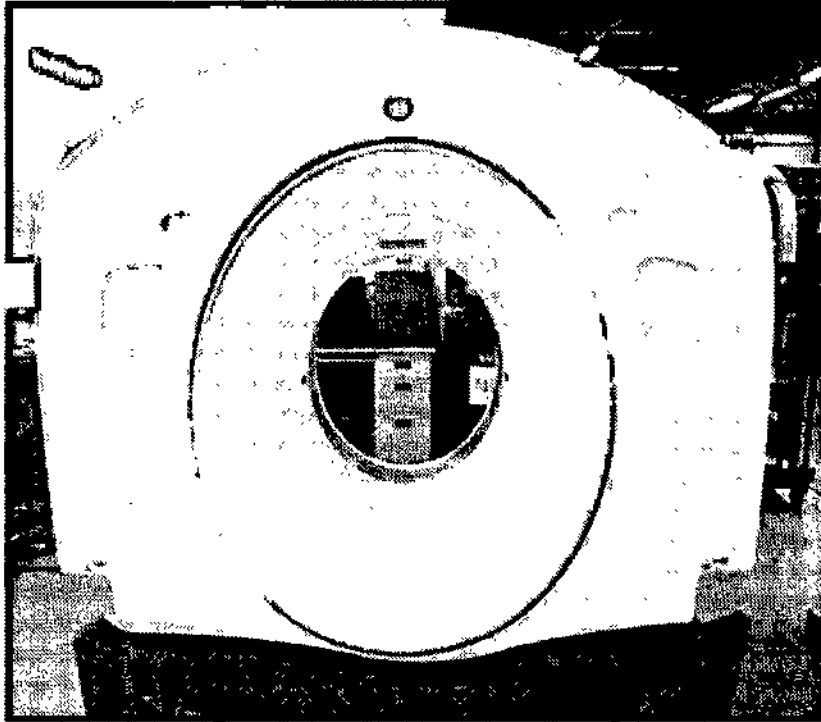Figura 5-5 Panel posterior del estativo



Parte izquierda Panel de conexión Lado derecho

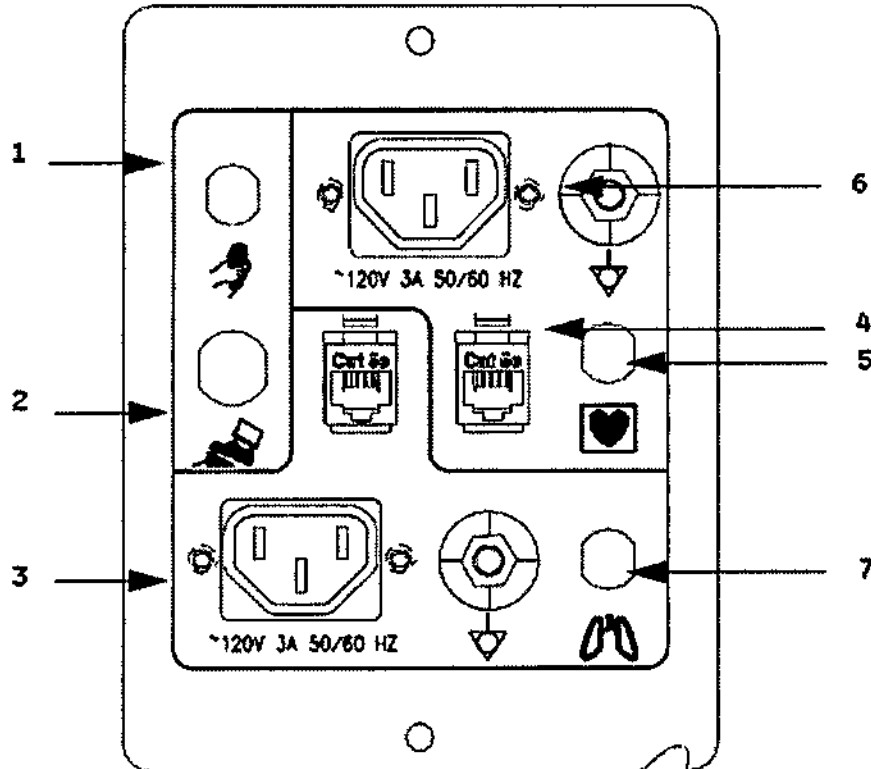Figura 5-6 Panel de conexión posterior derecho




Mario Micudoi
Gerente
Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
DIRECTOR TECNICO
GENERAL HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Número	Descripción
1	Conexión del control manual SmartStep
2	Conexión del control del pedal SmartStep
3	Conexión de la potencia del monitor respiratorio
4	Conexión Ethernet del monitor cardiaco
5	Conexión de sincronización del monitor cardiaco
6	Conexión de potencia del monitor cardiaco
7	Conexión de sincronización del monitor respiratorio

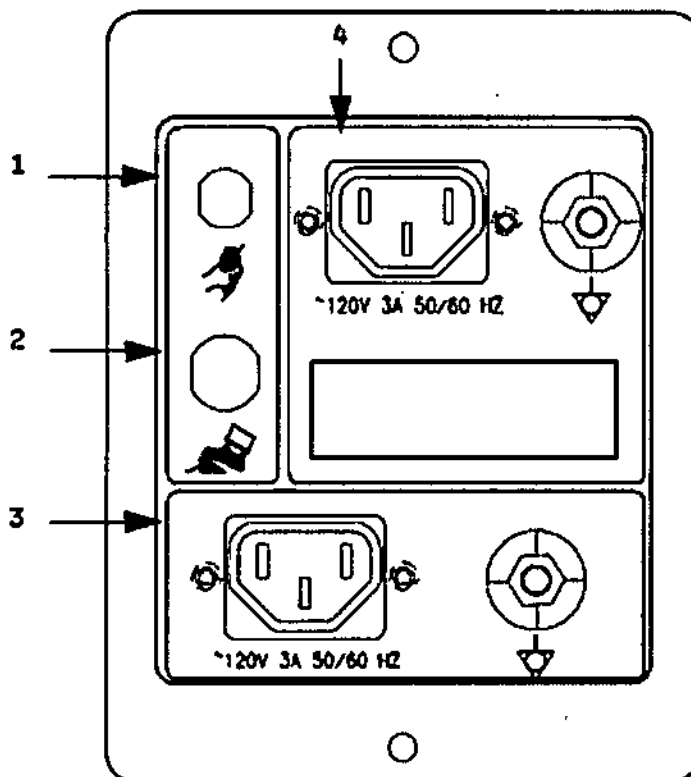Figura 5-7 Panel de conexión posterior izquierdo



Número	Descripción
1	Conexión del control manual SmartStep
2	Conexión del control del pedal SmartStep
3	Conexión de alimentación del accesorio
4	Conexión de potencia del monitor SmartStep


Micucci
Argentina S.A.

CELO GAROFALO
DIRECTOR TECNICO
HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

14028



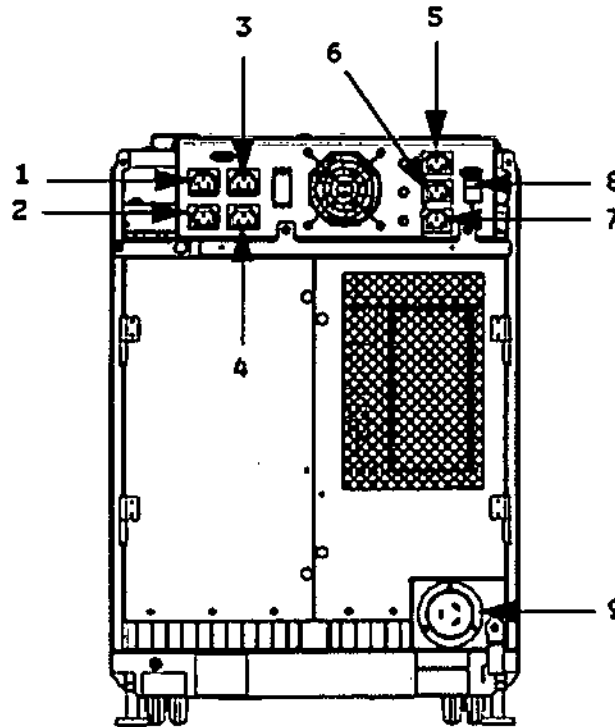Figura 5-8 Panel de conexión posterior de la consola NIO16



Número	Nombre	Descripción
1	Salida de potencia	Conexión de potencia del hardware de la pantalla del monitor
2	Salida de potencia	Conexión de potencia del hardware del monitor de exploración
3	Salida de potencia	Conexión de potencia del hardware de la torre de comunicaciones
4	Salida de potencia	Conexión de potencia del hardware del monitor de la sala exploración
5	Salida de potencia	Conexión de potencia del hardware del inyector
6	Salida de potencia	Conexión de potencia del hardware de sincronización respiratoria.
7	Salida de potencia	Salida de reserva
8	Interruptor de circuito	Interruptor de potencia
9	Toma de potencia	Conexión con la potencia principal de entrada


Computadora (Consola del operador)

La computadora está situada en la base de la consola y contiene todo el hardware necesario para utilizar el sistema y generar las imágenes.

Martín Micucci
 Gerente
 GE Healthcare Argentina S.A.

Marcelo Garofalo
 CO-DIRECTOR TÉCNICO
 GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

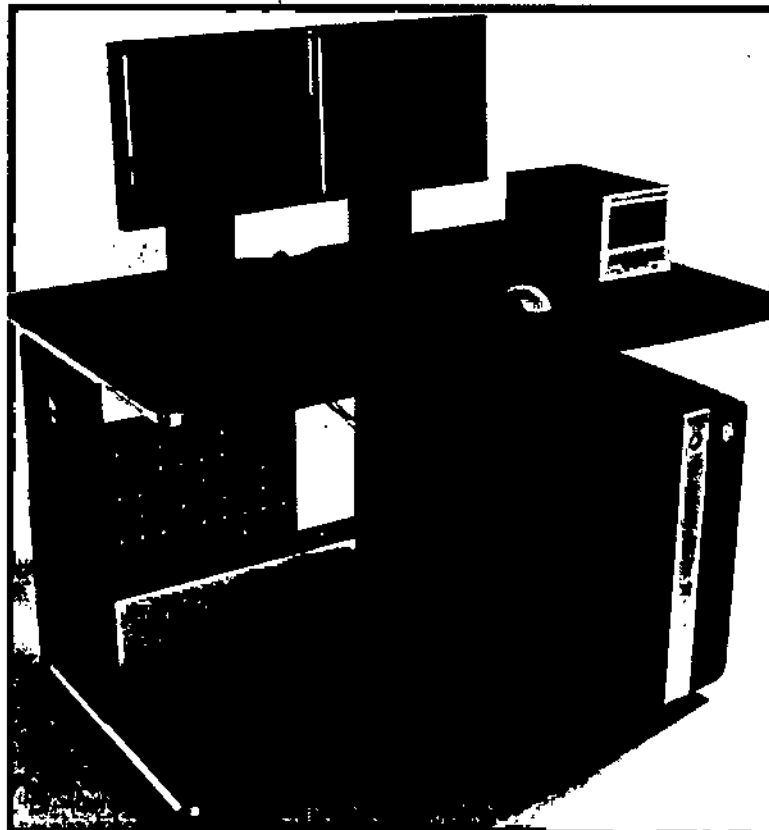Figura 5-9 Consola NIO16



Tecnología EXTM Xstream

La consola del operador es un sistema informático de tipo PC con un sistema operativo basado en Linux. El sistema incorpora un puerto de red gigabyte y almacena hasta 250.000 imágenes de 512.

Motor de reconstrucción

El hardware del motor de reconstrucción ofrece tiempos de reconstrucción de hasta 16 imágenes por segundo en base a la configuración del mismo. Esta mayor velocidad aumenta las capacidades de SmartPrep para poder sincronizar de manera más precisa la aplicación de material de contraste para una amplia variedad de exámenes.

Aplicaciones en la consola del operador (OC)

Interfaz de usuario común con Advantage Windows para mejorar la productividad. La consola del operador incorpora ahora una lista ampliada de paquetes de aplicaciones avanzadas, tales como el visor de volumen, la perfusión CT 4 multiórganos o sólo neuro, Advantage CTC Pro, AutoBone, CardIQ Xpress 2.0 Plus, AVA Xpress, Card EP y Dentascan.

El CardIQ Xpress 2.0 Plus y CardEP está disponible para la Optima CT540 Series.

El visor de volumen es un requisito previo para el uso de Advantage CTC Pro, AutoBone, CardIQ Xpress 2.0 Plus, y AVA Xpress.

En la parte superior de la mesa de la consola hay una torre de comunicaciones.

Σ

Mario Micucci
Gerente General
GE Healthcare Argentina S.A

GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A



Tabla 5-9 Descripción del dispositivo

Nombre del dispositivo	Descripción
Lectura/ escritura del disco de video digital (DVD-R/W)	La opción CD/DVD (Intercambio) en el Browser (Explorador) del escritorio Image Works utiliza la unidad de DVD-R para grabar en CD-R o DVD-R. La opción CD/DVD puede restaurar datos desde un CD-R y DVD-R. La opción Data Export (Exportación de datos) en el explorador del escritorio Image Works sólo puede guardar información en CD-R. Esta unidad también puede utilizarse para guardar trazos ECG y para obtener acceso a copias electrónicas de la Guía de aprendizaje y referencia, el Manual de referencia técnica, las Precauciones y advertencias sobre las aplicaciones y las Instrucciones rápidas.
Memoria de acceso azaroso al disco de video digital (DVD-RAM) (de estar disponible en su sistema)	El DVD-RAM se usa para explorar datos, guardar archivos explorados, protocolos y archivos de servicios hasta 9.4GB DVD-RAM de medios o 4.7GB DVD-RAM.
Conexiones para iLinq y para las funciones técnicas de la computadora	En la parte frontal de la consola están las conexiones para iLinq y para las funciones técnicas del equipo. También hay un puerto de conexión compatible con un dispositivo USB externo para guardar datos de exploración. Esas funciones deben ser utilizadas únicamente por personal de mantenimiento autorizado.
Interruptor de encendido de la computadora	<p>Está situado en la parte delantera de la consola y es el interruptor de encendido/apagado. Si se apaga la alimentación utilizando este interruptor y el panel de alimentación del control de desconexión principal (A1) (interruptor automático), la alimentación no se podrá restaurar en el equipo a menos que el interruptor de encendido/apagado se encienda una vez que la alimentación del control de desconexión principal se haya restaurada.</p> <p>NOTA: En un flujo de trabajo normal, el sistema debería cerrarse haciendo clic en [Shutdown] (Cerrar) en el monitor derecho antes de desactivar la alimentación.</p>

Consola Freedom WorkSpace (FWS)


El innovador hardware crea un entorno de trabajo único, práctico y ergonómico. Ofrece flexibilidad para colocar el monitor en posición horizontal o vertical. Los brazos del monitor están diseñados para ajustarse rápida y fácilmente. La consola FWS puede también reducir el ruido y el calor mediante ubicación remota de la consola comparada con la computadora de escritorio de una sola pieza. Para saber cómo ajustar la consola FWS, puede consultar el manual de instalación que se suministra con el sistema

E

Mario Micucci
 Gerente Técnico
 GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO C. BOFALO
 GERENTE TÉCNICO
 GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

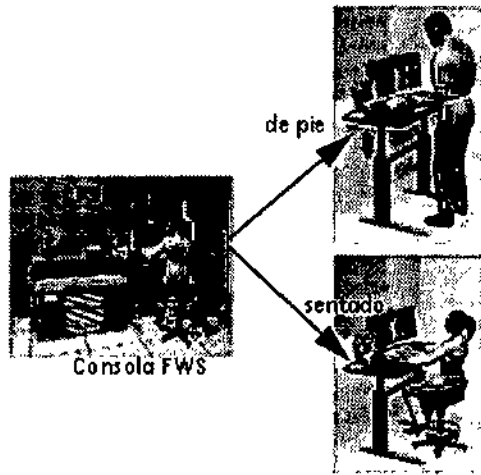Figura 5-11 Consola de computadora con mesa contigua (Consola FWS)



Mesa

Optima CT540 Series:

Para mesas de 500 libras, la mesa tiene un límite de peso de 500 libras (227Kg.) con una precisión incremental de $\pm 0,25\text{mm}$. El rango vertical de la mesa es de 49 a 99 centímetros. La gama de la vista de reconocimiento es de 1.600 mm y la de exploración de 1.730 mm.

NOTA: El rango máximo de reconocimiento depende de la altura de la mesa. La marca que muestra el rango de reconocimiento máximo no puede ser ajustada, depende de la altura de la mesa. Ajuste la posición del paciente para colocar la parte objeto dentro del rango escaneable con margen.

Correas de la mesa

Debajo de la mesa se encuentran las correas de los detectores de colisión. Estas correas se sitúan en zonas en las que pueden producirse choques de la mesa contra cuerpos extraños, como una silla de ruedas o una camilla. Si se toca una de las correas, el movimiento de la mesa y el estativo se interrumpe de inmediato. Levante la mesa y retire el obstáculo.

A continuación podrá seguir bajando la mesa.

Maria Micucci
Gerente
Healthcare Argentina S.A.

Roberto Garofalo
CO-DIRECTOR TECNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Figura 5-12 Correas de la mesa de la Optima CT540 Series


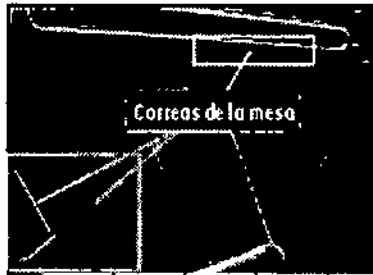


Figura 5-13 Correas del sensor de colisión

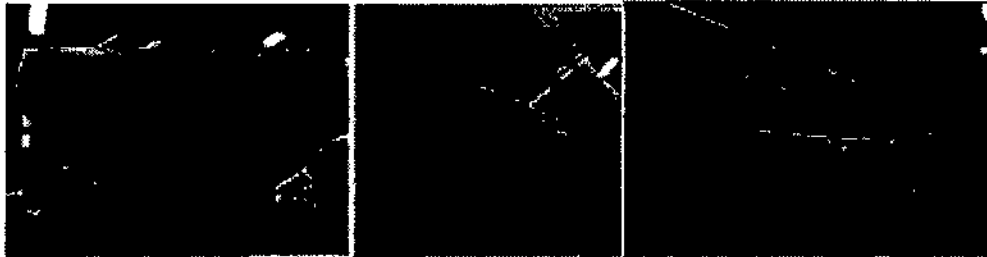


NOTA: El rango de exploración máximo y la inclinación del estativo dependen de la altura de la mesa. La marca de la camilla para el rango explorable máximo está basada en el centro de la mesa respecto al isocentro. Compruebe que el paciente esté posicionado dentro del rango explorable y utilice el botón Table Travel Limit (Límites del recorrido de la mesa) del panel de control del estativo para comprobar los límites.

Monitores

El sistema dispone de dos monitores (Figura 5-14). a la izquierda está el de exploración y a la derecha el de imagen.

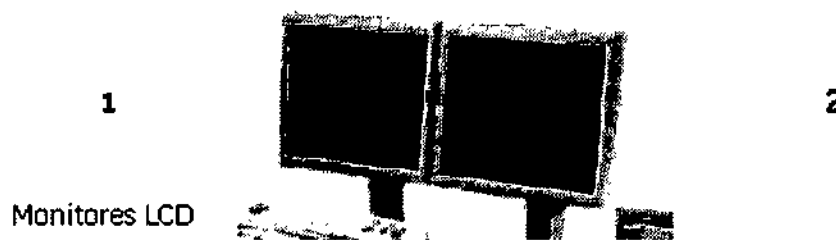Figura 5-14 Monitores



Monitores LCD

NOTA: Si se ha apagado la alimentación de los monitores apagando la consola o utilizando el botón de apagado, los monitores tardarán 15 minutos en estabilizarse con los niveles de contraste y brillo establecidos. Durante este tiempo de calentamiento, no realice ningún ajuste en los niveles de brillo y contraste.

1. **Scan Monitor** (Pantalla de exploración): la pantalla de exploración contiene la interfaz del usuario que controla todos los aspectos de la exploración, desde que se introduce la información del paciente hasta que finaliza el examen del paciente. La interfaz también incluye el control de los protocolos de exploración, la manipulación de datos de exploración y el mantenimiento del sistema, por ejemplo, calibraciones y calentamiento del tubo.

Maria... Micucci
...erada
GE Healthcare Argentina S.A.

...ACION CONTROL
...ODUCTOS...
...HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



Funciones del nivel superior (de izquierda a derecha):

Nuevo paciente - Para comenzar con un nuevo paciente.

Paciente de emergencia: Para comenzar con un paciente de emergencia.

Patient Schedule (Programación del paciente) - Sirve para preprogramar la información del paciente y obtener información de DICOM HIS/RIS.

Protocol Management (Administración de protocolos) - Sirve para crear, modificar y eliminar los protocolos de exploración y voz.

Retro Recon (Reconstrucción retrospectiva) - Sirve para reprocesar los datos de exploración y crear nuevas imágenes.

Recon Mgmt (Administración de reconstrucción) - Sirve para hacer una pausa, reanudar o eliminar la reconstrucción. También usada para guardar y recuperar o proteger y desproteger datos de exploración.

Daily Prep (Preparación diaria) - Sirve para realizar el calentamiento del tubo, o las calibraciones rápidas.

Herramientas del escáner - Para que el técnico de servicios realice las calibraciones del maniquí.

Área de mensajes de la consola del operador - Situada sobre los botones, es una barra blanca en relieve en el centro de la línea blanca. Al hacer clic en esta barra aparece una lista de mensajes sobre el monitor de exploración.

NOTA: Los detalles acerca de cada una de las funciones, excepto las del área de mensajes de la consola del operador, se cubren en varios capítulos de este manual.

2. Display/Image Monitor (Monitor de imagen) - este monitor contiene el área de selección del escritorio y el área de estado de funciones en el margen superior izquierdo.

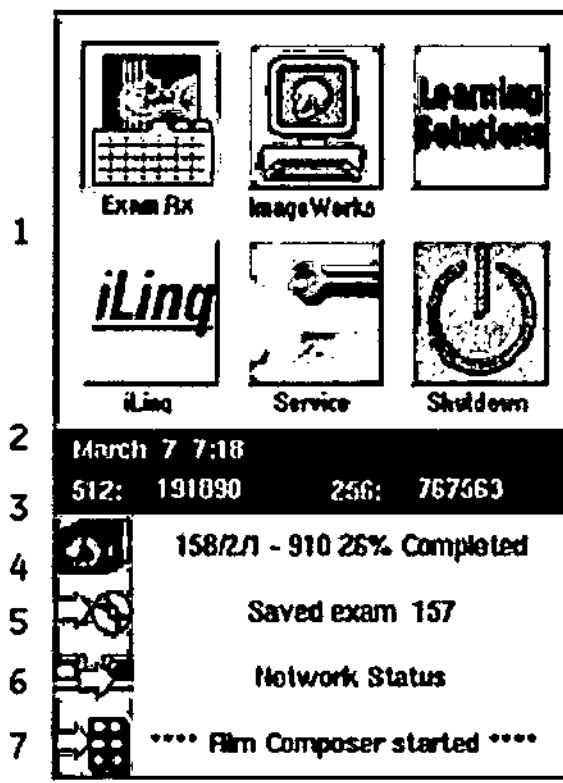
En esta sección nos centraremos en las áreas de selección del escritorio y de estado de las funciones. Estas áreas son visibles en todos los escritorios excepto en Learning Solutions.

Los botones de función del escritorio y el área de visualización de la imagen se describen en otros apartados de este manual.

Los números de la ilustración debajo corresponden a las definiciones numeradas a continuación.

E
 Marie Micucci
 GE Healthcare Argentina S.A.

[Signature]
 MARCELO GARGALLO
 COORDINADOR TÉCNICO
 GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



1. **Escritorios** - Podemos considerar los escritorios como entornos de trabajo. Al abrir un escritorio, las funciones relacionadas con él aparecen en el monitor de imagen. He aquí los escritorios disponibles:

Examen Rx - Sirve para ver las imágenes cuando está haciendo la exploración, fotografiarlas manual o automáticamente y aplicar las medidas y otras funciones a una imagen.

Image Works (Funciones de imagen) - Sirve para ver otros exámenes, archivar, enviar por red, eliminar, fotografiar manualmente, aplicar medidas y otras funciones a una imagen, realizar reformas de 2D y acceder a las funciones opcionales del software.

Soluciones de aprendizaje - Sirven para acceder a la información del operador en la base electrónica.

iLinq - Sirve para ponerse en contacto con los ingenieros del centro en línea GE y con la línea de respuesta de los especialistas en aplicaciones a fin de enviar y recibir información relacionada con el sistema. Dentro de este escritorio, también podrá acceder a las 10 preguntas más frecuentes y a una base de datos de búsqueda.

Servicio - Utilizado fundamentalmente por los ingenieros de campo para guardar exploraciones y/o protocolos de voz y para realizar diagnósticos del sistema.

Apagado - Sirve para reiniciar el sistema, apagar el ciclo de potencia del sistema o para que el usuario se desconecte del HIPAA.

2. **Área de estado de las funciones:** contiene las siguientes áreas

➤ **Fecha/Hora/Espacio de imagen:** muestra la fecha y la hora en curso y el espacio libre en el disco del sistema para imágenes de matriz de 512² y de 256².

14028

➤ **Reconstrucción** - Muestra el estado del examen en curso o del más reciente, de las series y de la reconstrucción de imágenes. Este estado incluye la reconstrucción prospectiva o retrospectiva.

♦ En los sistemas Xtream y Xtream EX, la reconstrucción muestra el examen, la serie, el rango de imágenes y el porcentaje completo.

➤ **Archivo** - Muestra el examen en curso o el más reciente, la serie y el estado del archivo de imágenes. Este estado incluye **guardar** o **restaurar**.

➤ **Red** - Muestra el examen en curso o el más reciente, la serie y el estado de la imagen en la red. Este estado incluye **enviar** o **recibir**.

➤ **Fotografiar** - Muestra el estado de las fotografías en curso o más recientes.


➤ **Mensaje actual** - Esta área tiene dos funciones. Si hace clic en ella, se abre una lista de todos los mensajes del sistema. No se trata necesariamente de mensajes de error, sino de cualquier mensaje informativo generado por el sistema. La segunda función consiste en crear mensajes sobre el sistema para el técnico de servicios utilizando **[Memo]**. Cuando hace clic en **[Memo]**, aparece un menú.

Asegurándose de que el cursor se encuentre en el área del menú, puede escribir un mensaje y luego hacer clic en **[Save] (Guardar)**. El mensaje ahora forma parte de los archivos de registro. El técnico especialista puede consultar este mensaje en otro momento viendo el archivo de registro, al que se puede acceder seleccionando **[View Log] (Ver archivo)**. También puede ver el registro de errores por medio de **[View Log] (Ver registro)**.

Teclado y módulo de interfaz de exploración

El teclado y el módulo de la interfaz de exploración contienen teclas alfanuméricas típicas, 10 teclas numéricas y botones específicos para iniciar la exploración, la inclinación remota del estativo y la comunicación con el paciente.



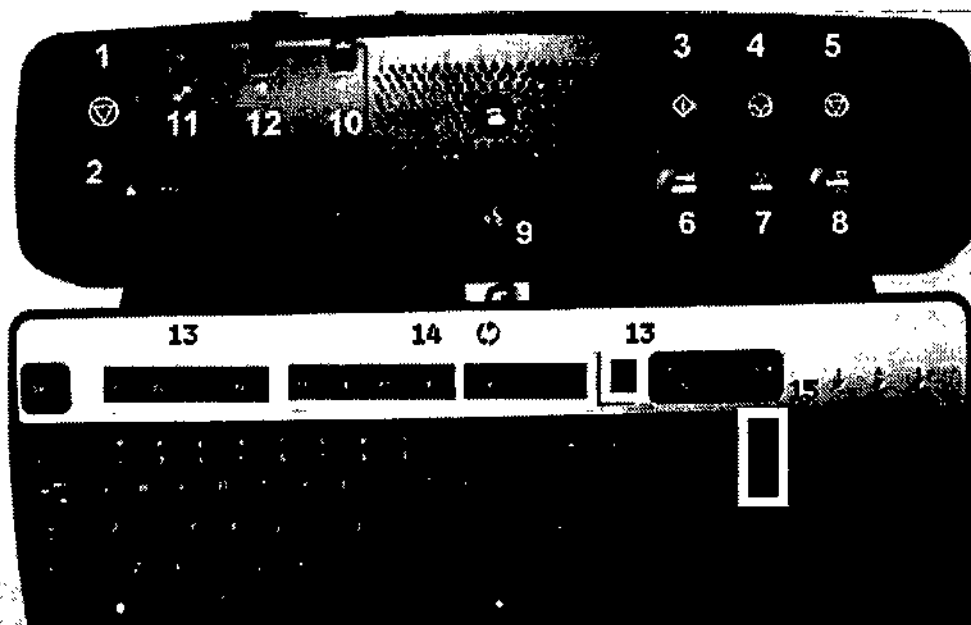





Figura 5-15 Consola GSCB NIO16 con parada de emergencia conforme a IEC 3ª edición.



Maria Larada
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCO GAROFALO
COORDINADOR TECNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Los números de la ilustración anterior corresponden a las definiciones numeradas a continuación.

1. **Emergency Stop (Interruptor de emergencia)** - En caso de emergencia, presionar el interruptor de emergencia detendrá todos los movimientos de la mesa y del estativo, así como cualquier exposición de rayos X que esté en progreso.
 2. **Indicador de exposición** - El  (indicador de exposición) se ilumina en ámbar durante la exposición.
 3. **Comenzar la exploración** - El  indicador (comenzar la exploración) parpadea en verde una vez que el tubo ha alcanzado la velocidad de exposición. Pulse el botón para iniciar la exploración. La opción Comenzar la exploración parpadeará durante 30 segundos antes de apagarse. Presione el botón de color verde Comenzar exploración de nuevo para que el sistema vuelva a estar listo para explorar.
 4. **Pausar exploración** - Al presionar  (pausar exploración), el sistema pone en pausa la exploración una vez que se ha completado la exploración en curso. Para reanudar la exploración, seleccione **[Resume] (Reanudar)** en la pantalla de ver/editar.
 5. **Detener exploración** - Al presionar  (detener exploración), la exploración se cancela inmediatamente. Para reanudar la exploración, seleccione **[Resume] (Reanudar)** en la pantalla de ver/editar.
 6. **Mover para explorar** - El indicador  (mover para explorar) parpadea en verde indicando que el sistema está listo para que se desplace la camilla a la posición inicial. Basta con pulsar el botón para mover la camilla hacia delante. El indicador de la opción Mover para explorar parpadeará durante 180 segundos antes de apagarse.
 7. **Detener movimiento** - Al presionar  (Detener movimiento) se interrumpe el movimiento de la camilla hacia dentro y hacia fuera. Para reanudar la exploración, seleccione **[Resume] (Reanudar)** en la pantalla de ver/editar.
 8. **Inclinación remota (Inclinación prescrita)** - Presione el botón  (Inclinación prescrita) y manténgalo presionado hasta lograr la inclinación prescrita.
- NOTA:** El botón de inclinación remota en el módulo de interfaz de control de la exploración se puede utilizar para que el estativo (Gantry) vuelva a cero una vez que se hayan adquirido todas las exploraciones prescritas para el examen.
9. **Talk (Hablar)** - Al presionar  (Hablar) y hablar dirigir la voz hacia el intercomunicador que está encima del botón, podrá comunicarse con la sala de exploración.

Maria Micucci
Gerada
Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GARIBAYO
DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



10. Control del volumen (Del operador al paciente) - el disco de control de volumen de la voz del operador al paciente está situado debajo del indicador en la parte delantera del teclado. Este disco controla el volumen de la voz del operador cuando éste se dirige al paciente. Mueva el disco hacia arriba para aumentar el volumen y hacia abajo para disminuirlo. El disco lleva números para que vea el nivel del volumen.



11. Control del volumen (Voz automática o estativo) - El Control de volumen de voz automática al estativo está situado debajo del indicador en la parte delantera del teclado. Este disco controla el volumen de la voz automática al estativo. Mueva el disco hacia arriba para aumentar el volumen y hacia abajo para disminuirlo. El disco lleva números para que vea el nivel del volumen.



12. Control de volumen (Del paciente al operador) - El disco de (Control de volumen del paciente al operador) está situado debajo del indicador en la parte delantera del teclado. Este disco controla el volumen de la voz del paciente cuando éste se dirige al operador. Mueva el disco hacia arriba para aumentar el volumen y hacia abajo para disminuirlo. El disco lleva números para que vea el nivel del volumen.

13. Teclas de fotografiado - Las teclas de función **F1-F4, F12** pueden usarse para fotografiar en el Film Composer manual. La tecla de función **F3** en conjunto con Shift, y la tecla de función **F12**, se pueden utilizar para fotografiar en en el AutoFilm Composer.

Tabla 5-10 Teclas de función

Tecla F	Descripción	Texto traducido
F1	Fotografiar imagen	
F2	Fotografiar pantalla	
F3	Fotografiar MID	
F4	Imprimir la serie	
F12	Auto grabación de imagen	

14. Teclas de valores predefinidos de anchura y nivel de la ventana - Las teclas de función **F5 - F11** se utilizan para aplicar los valores WWWWL predefinidos almacenados en las preferencias del usuario en los trabajos de imagen. Las teclas pueden usarse para ajustar el WWWWL usando los valores preestablecidos en los puertos de vista del Examen Rx, en el visor y Mini-Visor de la Imagen de Trabajo y en el reformateo.

Tabla 5-11 Teclas de función

Maria Micucci
Gerada
GE Healthcare Argentina S.A.

ROSALE
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Tecla F	Ventana/Nivel	Texto traducido
F5	Anterior	
F6	Abdomen	
F7	Cabeza	
F8	Pulmones	
F9	Mediastinum (Mediastino)	
F10	Spine	
F11	Vértebra W/L	


15. **Page Up/Page Down (Página hacia arriba/hacia abajo)** - Las teclas página hacia arriba y página hacia abajo le permiten revisar las imágenes previas y posteriores en uno o más puertos de vista de los escritorios de examen RX o Image Works.

16. **Window Width/Window Level Control Keys (Teclas de control de anchura y nivel de ventana)** - Puede utilizar estas teclas para cambiar manualmente la configuración WW/WL de las imágenes en los escritorios de examen Rx o Image Works. Las teclas (Up/Down) (Arriba/Abajo) aumentan y reducen el nivel de la ventana y las teclas (Left/Right) (izquierda derecha) aumentan/disminuyen la anchura de la ventana.

Ratón

El ratón se usa para hacer selecciones en los monitores de exploración e imagen. Se trata de un ratón estándar de tres botones, configurado para el sistema.

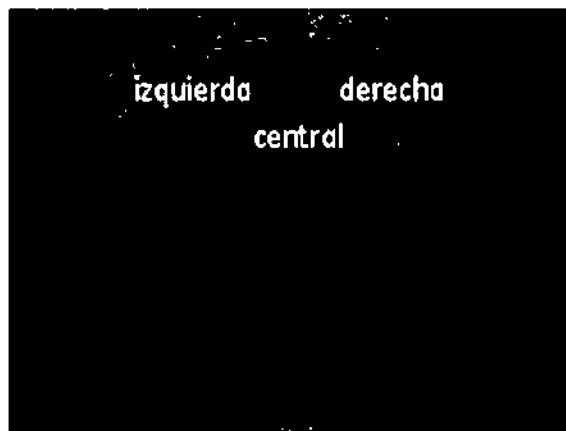Figura 5-16 Arrastrar y soltar



Los tres botones se conocen como los botones izquierdo, central y derecho. En este manual, el término "hacer clic" se refiere a pulsar y soltar el botón izquierdo. El término "doble clic" se refiere a hacer clic rápidamente y soltar el botón izquierdo del ratón dos veces. El término "triple clic" se refiere a hacer clic rápidamente y soltar el botón izquierdo del ratón tres veces.

Para la mayoría de las selecciones que se requieren durante la exploración y los procesos de revisión es necesario hacer un solo clic con el botón izquierdo del ratón. Este es el botón principal para realizar la selección. El botón central se usa fundamentalmente para ajustar la anchura y el nivel de ventana. El botón derecho se usa ocasionalmente para recorrer y ampliar imágenes y acceder a menús ocultos.

NOTA: Para ver la terminología específica y las descripciones sobre el ratón utilizadas en este texto, consulte Tabla 1-1 en el capítulo Acerca de esta guía.

Bright Box (Control de cursor) (Opcional)

El control de cursor (Figura 5-17) es una parte independiente del hardware que se puede utilizar para revisar imágenes sin tener que utilizar exclusivamente el ratón o el teclado. El uso del control de cursor permite a un usuario revisar una o varias imágenes, mientras que otro usuario puede utilizar el ratón y el teclado para configurar o continuar la serie de exploración.


El control de cursor sólo puede utilizarse en el escritorio Exam Rx con una ventana de visualización "libre". El término "libre" hace referencia a una ventana de visualización no utilizable para la visualización o filmación automáticas. La caja de brillos puede utilizarse en el puerto de visualización Autolink, aunque cuando se reconstruye la primera imagen de otra serie, esa imagen aparece en el puerto de visualización, sustituyendo a la serie que esté viendo en ese momento. Se recomienda que haga clic en la pantalla de revisión, en el puerto de visualización inferior, como puerto "libre".

Sólo puede trabajar en un puerto a la vez. Antes de empezar, haga doble clic en el puerto de visualización deseado para situarlo en primer plano, de modo que no afecte al resto de los puertos.

NOTA: Tanto el ratón como el control de cursor tienen que conectarse al sistema para que puedan funcionar adecuadamente. Si se quitan, el sistema experimentará bloqueos del ratón e interrupciones.

NOTA: Para obtener información adicional sobre los puertos de vista principales y secundarios, consulte el Área de visualización de la pantalla de imagen capítulo.

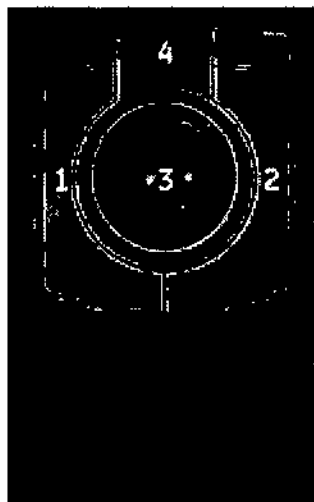Figura 5-17 Control de cursor



Los números de la ilustración anterior corresponden a las definiciones numeradas que presentamos a continuación.

1. Prior Button (Botón anterior) - Al presionar este botón se muestra la imagen anterior del grupo. Este botón permanece inactivo durante el modo de hojearo.

2. Next Button (Botón siguiente) - Al presionar este botón se muestra la siguiente imagen del grupo. Este botón permanece inactivo durante el modo de hojearo.

E-

Maria Micucci
Argentina S.A.
GE Healthcare

COPIA G. R. PAVO
COPIA G. R. PAVO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.


3. **Trackball (Bola trazadora)** - La bola trazadora tiene dos funciones. La primera, si no está en modo de hojeado, es ajustar la anchura y el nivel de ventana. Muévela hacia la izquierda para reducir la anchura o hacia a la derecha para aumentarla. Si desea reducir o aumentar el nivel de ventana, desplace la bola hacia abajo o hacia arriba respectivamente. Si el sistema se encuentra en modo de hojeado, el movimiento de la bola hacia arriba recorre la secuencia de principio a fin, a la velocidad con que la desplace. Mueva la bola de trazado hacia abajo para recorrer la secuencia desde el final hasta el principio, a la misma velocidad con que mueve la bola.

4. **Pagin button (Botón de paginación)** - El botón de paginación se utiliza para pasar las páginas de una secuencia de imágenes. Una vez establecido el puerto de vista primario, haga doble clic en este botón para iniciar el hojeado. Observe que aparece la letra "P" en la parte inferior derecha del puerto de vista, indicando que el modo de paginación está activo. Los botones Anterior y Siguiente se desactivan y la bola trazadora se usa para recorrer la secuencia de imágenes. Mientras se encuentra en el modo de paginación, puede hacer clic una vez en el botón de paginación para cambiar al modo de anchura y nivel de ventana. Esto se indica mediante una "WL" que sustituye a la "P" en la parte inferior derecha de la ventana de visualización. Desde este momento, la bola trazadora controla los valores de WWWL. Si pulsa de nuevo el botón de hojeado, volverá a este modo. Para salir de él, haga doble clic en el botón. La "P" en la esquina inferior derecha del puerto de vista desaparece para indicarle que ha salido del modo de paginación.

Unidad de distribución de potencia (PDU)

La PDU suministra potencia a varias piezas del sistema entre las que se incluyen los componentes del estativo, la mesa y la consola del operador. En la parte delantera de la PDU existen controles que se utilizan para indicar si la alimentación está conectada a la unidad, un botón para encender/apagar la alimentación del estativo y la mesa y un botón de parada de emergencia.

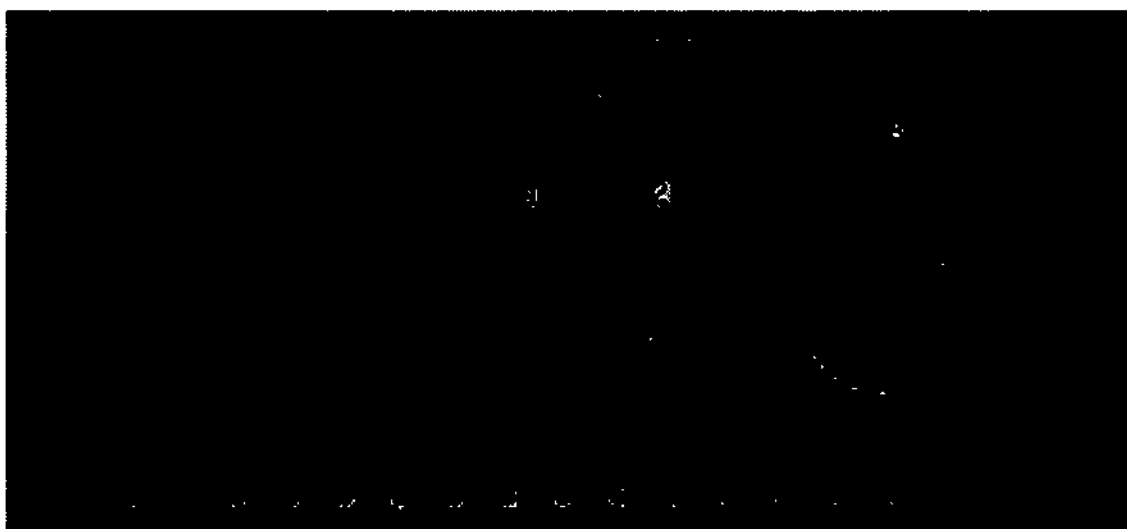Figura 5-18 Panel delantero de la unidad de distribución de potencia



E.
M. Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
CONSTRUCTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Función	Descripción
1. Potencia	Indica si la unidad está encendida o apagada
2. Activación del estativo	Activa/desactiva la alimentación del estativo y de la mesa
3. Interruptor de emergencia	Cuando se presiona, se detienen todos los movimientos de la mesa y del estativo, así como la generación de rayos X, y se apagan las luces láser de alineación. El sistema interrumpe cualquier procedimiento de recopilación de datos en curso y trata de guardar todos los datos recolectados antes de la interrupción. Utilice el interruptor de emergencia en el caso de emergencias relacionadas con los pacientes. La camilla y la base también se liberan y deben volverse a bloquear antes de comenzar la exploración.

Convenciones de los usuarios

Estas son las convenciones que se utilizan durante toda la interfaz del usuario. La mayoría de ellas aplican al proceso de establecimiento de la exploración.

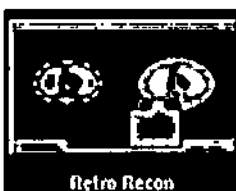
Las funciones que están activas aparecen resaltadas en amarillo.



Las funciones que no están disponibles porque otra función está abierta aparecen en gris.



Si se abre una función y luego se abre otra, la primera que se abre se resalta con una esquina doblada indicando que sigue abierta y activa. La segunda función que se abre es la que está actualmente activa.



Mercado
Parada
GE Healthcare Argentina S.A.
Miccusi

MARCELO GONZALEZ
COORDINADOR GENERAL
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

14028



Una vez que el examen de un nuevo paciente se ha comenzado y se están configurando los parámetros de exploración desde la pantalla ver/editar, dichos parámetros aparecen enumerados en columnas. Puede cambiar los parámetros de prescripción haciendo clic en el encabezado de la columna o en el valor del parámetro directamente. El cambio de una prescripción a través del encabezado de la columna cambia el parámetro de todas las filas correspondientes. Para cambiar el parámetro de un grupo específico, haga clic sobre el parámetro deseado bajo el encabezado de columna correspondiente.


kV	mA
120	240
120	240

La selección de parámetros que están representados por un botón en relieve, cuando se seleccionan, muestran un menú que le solicita hacer clic o escribir en el parámetro deseado.


Select the desired kV							
80	100	120	140	Cancel			
No of beams	Index Speed	Interval (mm)	Gasley filter	GrOV	kV	mA	Total Exposure (mAs)
16	2.5 41	10.000	30.0	Large body	120	240	4.0
32	2.5 41	10.000	30.0	Large body	120	240	8.0

Las selecciones de parámetros con una apariencia hundida y un fondo blanco permiten, al seleccionarlas, escribir el valor deseado.

Thick Speed	Interval (mm)
2.5 41	10.000
2.5 41	10.000

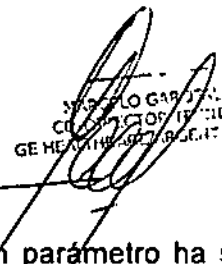
 SISTEMA GASLEY
 CONSTRUCTORES S.A.
 GENERAL MANAGERS ARGENTINA S.A.


Cuando un parámetro aparece resaltado en naranja, indica que un parámetro ha sido ajustado por el sistema a partir del valor preestablecido original. El cambio de un parámetro puede afectar a otros parámetros. En este caso, es posible que tenga más de


 Maria Micucci
 Gerada
 Argentina S.A.

un parámetro resaltado en color anaranjado. En este ejemplo, el tipo de exploración cambió de helicoidal a axial. El ISD ha cambiado y también los parámetros en la tarjeta de la ficha de reconocimiento. No obstante, si desea continuar deberá revisar los parámetros para asegurarse de que son necesarios para el protocolo clínico).

mA	Total Exposure (Time)	Prep Group (s)	ISD (s)	Resp. Hal. (s)
260	4.00	0.0	1.3	N
260	4.00	1.0	1.3	N

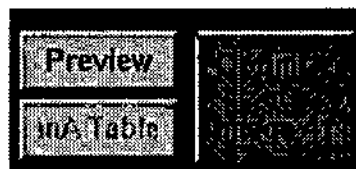Los parámetros resaltados en rojo indican que no puede continuar la exploración hasta que no se efectúe una corrección. (En el ejemplo mostrado, las técnicas seleccionadas para el examen son demasiado altas para el sistema, así que necesitaremos cambiar el parámetro antes de continuar.) Una vez realizada la corrección, puede continuar.



Si introduce un parámetro incorrecto, el sistema aplica por defecto el valor más próximo al mismo y un breve mensaje, que explica el cambio, aparece en el área de mensajes de la exploración. Si desea ver el mensaje de nuevo, haga clic en el parámetro modificado. (En este ejemplo, se introdujo el valor 400 mA, pero el sistema lo cambió a 380 mA).

kV	mA
120	380

08:59:35 The system reduced mA to the largest value possible at this kV.

Caja de herramientas


La caja de herramientas está situada en el monitor derecho en la esquina superior derecha de la pantalla del escritorio Image Works. En esta área puede seleccionar varias opciones.

Figura 5-19 Caja de herramientas

María Micucci
 gerente
 GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
 COORDINADOR TÉCNICO
 GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Autovoice Volume	1
Unix Shell - Left	2
Unix Shell - Right	3
Turn On Extend HU	4
Quick Snap	5
IQ Snap	6
Save ECG Traces	7
Restart Show Loc.	8
Anon Pat. Level	9
Export Protocols	10

1	Volumen de voz automática	<p>Si hace clic en esta opción podrá ajustar los niveles de volumen de voz automática en la sala del examen.</p> 
2	Unix Shell Left (Shell de unix izquierdo)	Muestra un shell de unix en la pantalla izquierda. Esta área es utilizada por el personal de mantenimiento.
3	Unix Shell Right (Shell de unix derecho)	Muestra un shell de unix en la pantalla derecha. Esta área es utilizada por el personal de mantenimiento.
4	Yum On Extended HU (Encender HU ampliado).	Si hace clic en esta opción, se activarán las unidades Houndsfield ampliadas.
5	Quick Snap (Instantánea)	<p>Si hace clic en esta opción se realiza una toma de todos los parámetros que ha prescrito e información de los procesos relacionados con la prescripción. Utilice esta opción cuando tenga problemas con el sistema para que el personal de mantenimiento tenga conocimiento de los problemas del sistema.</p> <p>Consultar: <u>Utilizar QuickSnap (Toma rápida)</u> pasos detallados del uso de la función.</p>



-14028

6	IQ Snap (Toma de IQ)	Si hace clic en esta opción después de seleccionar un conjunto de imágenes que se han hecho anónimas, se realizará una instantánea de las imágenes y se guardará el archivo de datos de la exploración relacionado con las imágenes y también los archivos de reconstrucción para que los revise el servicio de mantenimiento. Consultar: Utilizar IQ Snap (Toma de IQ) pasos detallados del uso de la función.
7	Save ECG Trace (Guardar trazo de ECG)	Utilizando un medio vacío colocado en la unidad CD de la consola del operador, podrá hacer clic en este botón para guardar el directorio de los 500 archivos de ECG más recientes desde los tipos específicos ECG sincronizados directamente al CD -R.
8	Restart Show Loc (Reiniciar mostrar localizador)	Utilice esta opción si el reconocimiento a las líneas no aparecen en Mostrar localizador. Si reiniciar Mostrar localizador no resuelve el problema, utilice el puntero de cruz para determinar las ubicaciones inicial y final y los centros R/L (Derecha/Izquierda) y A/P (Anterior/Posterior) del examen en curso. Será necesario reiniciar el sistema antes de comenzar el siguiente examen.
9	Anon Pat.Level (Nivel de paciente anónimo) Nivel	Haga clic en esta opción para determinar si la información del paciente anónimo se guarda con anotación parcial o total. Este es un botón de alternancia. El mensaje desplegable indica el estado actual y el estado de la transición a. Consultar: Utilizar paciente anónimo (Nivel de paciente Nivel) (Nivel) pasos detallados del uso de la función.
10	Export Protocols (Exportar protocolos)	Los protocolos del usuario para las categorías adulta y pediátrica pueden ser copiados a CD-R en formato Excel con las características de Exportar protocolos Se podrá editar el archivo una vez que se guarde en una PC utilizando el software Excel.

Product Network Filters - Filtros de red del producto (PNF)

Los filtros de red de productos ofrecen la posibilidad de colocar un firewall personal al frente del sistema. Los filtros se pueden configurar para restringir qué servicios del sistema pueden ser controlados por otros dispositivos que intenten obtener acceso a la consola del operador, por ejemplo, ftp, telnet y rlogin, y qué computadoras pueden obtener acceso al sistema. Este acceso se determina configurando las direcciones IP que permiten obtener acceso al sistema. También puede configurar el acceso DICOM al sistema.

La configuración predeterminada del sistema es para servicios no activados, direcciones IP no autorizadas y para el puerto DICOM 4006 activado.

Su técnico del servicio ayudará al operador y al departamento de IT a configurar los PNF.

Milucci
María Milucci
E. H. H. S. A. Argentina S.A.


MARCELO GAROFALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GENERAL ELECTRIC ARGENTINA S.A.

Descarga de software

La descarga de software proporciona un contrato de servicio a los sistemas conectados con banda ancha para que puedan descargar automáticamente las actualizaciones del software en el sistema. Estas actualizaciones se pueden configurar para que se instalen manual o automáticamente.

Un mensaje desplegable que indica que esta función está instalada en el sistema se mostrará durante las primeras 3 semanas en cada reinicio después de realizar una carga de software.

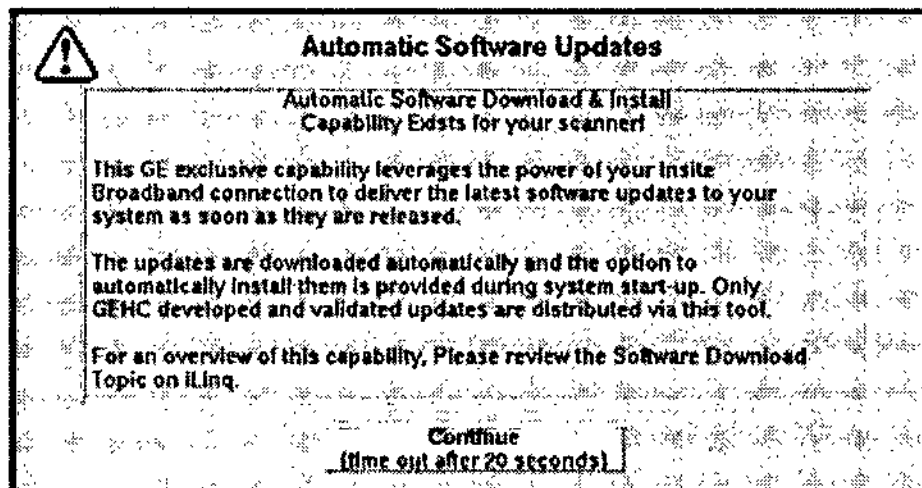Figura 5-20 Ventana de actualización automática de software



A medida que las actualizaciones están disponibles, aparecerá un mensaje desplegable que le informará de la actualización.

OptiDose

Durante muchos años, GE ha aplicado el principio ALARA (Tan bajo como sea razonablemente posible) para ayudar a sus clientes a optimizar la dosis. GE ha suministrado un gran número de herramientas para ayudar a los médicos a minimizar la dosis a la vez que consiguen la calidad de imagen necesaria para el diagnóstico clínico.

El CT de GE es líder reconocido por proporcionar eficacia de dosis en cada categoría de sistema. GE ha ganado esta posición mediante un enfoque de "sistema total".

En este manual aprenderá sólo algunos de los aspectos que forman parte de nuestro enfoque de "sistema total".

Características y tecnología de la dosis*

Protocolos pediátricos

Una amplia gama de protocolos pediátricos está disponible de acuerdo al tamaño, edad y peso del niño para adaptar la dosis o el tratamiento al tamaño del paciente.

Las categorías Head (Cabeza) y Orbit (Órbita) están basadas en la edad. El resto de categorías son protocolos basados en la altura y el peso.

AutomA/SmartmA

AutomA/SmartmA modula el tubo de rayos X para tener en cuenta la anatomía específica del paciente – basándose en los datos recopilados de la imagen de

C

Maria Micu
Gerada
GE HealthCare Argentina S.A.

MARCELO C. ROFALO
INSPECTOR TÉCNICO
GE ARGENTINA S.A.



14028

reconocimiento. El operador ingresa la calidad de imagen deseada (índice de ruido) y el sistema ajusta el mA para lograrla dentro de los límites del mA mín. y máx. ingresados.

SmarHelical (Helicoidal inteligente)

SmarHelical está integrado en todos los sistemas de GE. Disminuye el ruido de la imagen medida según el desvío estándar del píxel.

Visualizador automático para la I + D

Esta herramienta de lectura especializada ha revisado automáticamente millones de imágenes para ayudar a los ingenieros de GE a optimizar los algoritmos y los ajustes de pitch y todavía se sigue utilizando.

Presentado como el RSNA Paper 2001

Detector de matriz HiLight

El detector de matriz HiLight, desarrollado por GE específicamente para la exploración CT, proporciona una eficacia de absorción del 98%. También permite obtener un mayor número de cortes sin aumentar la dosis.

Sin colimación posterior a la aplicación al paciente

GE usa únicamente colimación previa al paciente, siempre y cuando la eficiencia del detector sea excelente en el modo de submilímetro.

Colimador de seguimiento

Desarrollado para los sistemas Optima CT540, el colimador de seguimiento mantiene el haz enfocado sólo en las celdas activas del detector, y permite hacer una exploración submilimétrica con una alta eficacia de dosis.

Asistente de protocolos

Ajusta automáticamente los parámetros afectados para mantener el ruido de la imagen constante, la dosis optimizada y dentro de las especificaciones del sistema.

Filtros Neuro3D

Son filtros de reducción de ruido para adquisiciones de corte fino para aplicaciones en las que los datos se manipulan en modos en 3D; tales como el reformateo o las proyecciones de intensidad máxima para aplicaciones neurológicas.

Reconstrucción iterativa estadística adaptable (ASiR)

ASiR es una tecnología de reconstrucción que puede permitir una mA reducida en la adquisición de imágenes de diagnóstico, permitiendo al médico reducir la dosis del paciente dependiendo de la tarea clínica, tamaño del paciente, ubicación anatómica y práctica clínica.

NOTA: * No todas las funciones se pueden utilizar en cada sistema.

Informes de dosis

CTDIvol, DLP (Producto dosis longitud), y Dose Efficiency (Eficacia de dosis) se muestran durante la prescripción de la exploración y le proporcionan información de la dosis del paciente. El CTDIvol, DLP y el tamaño del maniquí que se utiliza para calcular la dosis se guarda automáticamente después de seleccionar **End Exam (Finalizar examen)**. El informe de dosis se guarda como **Series 999**. Se puede fotografiar, archivar y enviar por red una vez que se haya completado la exploración.

Mariano Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
COMISARIO TECNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

-14028

Un DICOM Structured Dose Report (informe de dosis estructurado DICOM) genera un CT Dose Report (informe de dosis CT) lo que puede habilitar que el sistema RIS/HIS de seguimiento del hospital para que realice el seguimiento de dosis del paciente. El informe de dosis DICOM SR se guarda como parte del examen del paciente en Series 997. Actualmente no se puede abrir el informe de dosis DICOM SR en el sistema. Se puede revisar e imprimir usando la estación de trabajo Advantage Windows o cualquier otra estación que pueda leer el formato del informe estructurado DICOM.

El tiempo de exposición acumulada de SmartStep se muestra en la página de texto de dosis y en el informe de dosis estructurado DICOM.

Figura 5-22 Información de la dosis

Dose information				
Images	CTDIvol mGy	DLP mGy-cm	Dose Eff. %	Phantom cm
1-4	2.01	2.01	85.18	Body 32
5-8	2.01	2.01	85.18	Body 32
9-8	3.18	8.18	88.86	Body 32

Projected series DLP: 12.21 mGy-cm
Accumulated exam DLP: 12.21 mGy-cm

Dose Report					
Series	Type	Scan Range (mm)	CTDIvol (mGy)	DLP (mGy-cm)	Phantom cm
1	Scout	-	-	-	-
2	Axial	50.000-57.500	2.01	2.01	Body 32
2	Axial	50.000-57.500	2.01	2.01	Body 32
2	Helical	50.000-50.000	3.18	8.18	Body 32
Total Exam DLP:				12.21	

Dose Information Area

Scan Type	Start Location	End Location	No. of Images	Thick Speed	Interval (mm)	Gantry Tilt	SFOV
Axial Full 1.0 s	50.000	57.500	4	2.5 4i	10.000	0.0	Large
Axial Full 1.0 s	50.000	57.500	4	2.5 4i	10.000	0.0	Large
Helical Full 1.0 s	50.000	50.000	1	2.5 11.25 0.562:1	2.500	0.0	Large

Técnica de exploración

Dose Text Page

Si se ha instalado un tubo de un fabricante distinto de GE, aparecerá un mensaje de advertencia adicional en el área de información sobre dosis y en la imagen del informe de dosis.

Accesorios

No conecte accesorios que no están aprobados como parte del sistema.

No utilice accesorios de otras modalidades.

Ninguno de los accesorios soporta el peso completo de un paciente. Si se sienta, se para encima o aplica presión excesiva sobre estos dispositivos, éstos pueden romperse o

M. Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.

GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

soltarse de la parte superior de la mesa y, pueden provocar lesiones. Observe que si un accesorio se rompe, debe tener cuidado al recogerlo y no debe continuar usándolo.

Cuando esté utilizando accesorios de colocación del paciente que no sean opciones de GE, asegúrese que no haya áreas que puedan causar un punto de compresión o interferencias con el IV o tubo del paciente.

Los accesorios como los rieles para los brazos y los soportes para bolsas para catéteres no están sujetos al estativo y pueden interferir con el mismo si no están colocados adecuadamente.

Todos los aparatos no médicos conectados al puerto USB de la torre de comunicaciones de la consola del operador de CT deben cumplir la norma IEC/EN/UL60950-1 y estar aprobados por GE.

La utilización de accesorios no aprobados por GE puede afectar a la dosis y la calidad de la imagen.

Accesorios aprobados por GE

Utilice sólo equipos GE aprobados para a este sistema.

Revise todos los accesorios cada vez que los utilice y retire las piezas dañadas o agrietadas.

Tabla 2-3 Tipos y modelo

Tipo	Fabricante/Modelo
Monitor cardiaco	IVY 3100-B con Ethernet
	IVY 3100-A con Ethernet
	IVY 3100-B con Ethernet
	IVY 3150
	IVY 3150 - A
	IVY 3150 - B
	IVY 7800
Monitor respiratorio	Varian 1.6
	Varian 1.7
UPS parcial	9155-10GE
Lector de códigos de barras	Honeywell 3800g
Monitor SmartStep (incluye monitor LCD, divisor de vídeo y montajes)	GEHC 5115174-2
Control manual SmartStep	GEHC 2199947

M. Garofalo
M. Garofalo
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

14028

Tipo (Continuación)	Fabricante/Modelo (Continuación)
Pedal SmartStep	GEHC 2199945-2
inyector de contraste del paciente: Para el inyector Xstream opcional	Nemoto Dual Shot Alpha (CIA425 Clase II) /GEHC 5328194 Nemoto Dual Shot Alpha (CIA425 Clase IV) /GEHC 5328195 Nemoto Dual Shot GX (CIA425 Clase IV) Medrad ISI900 (para Stellant D) (CIA425 Clase 1 y Clase IV) / GE 5335919.
inyector de contraste del paciente: Para el inyector Xstream mejorado opcional	Nemoto Dual Shot Alpha (CIA425 Clase IV) /GEHC 5328195 Nemoto Dual Shot GX (CIA425 Clase IV) Medrad ISI900 (para Stellant D) (CIA425 Clase 1 y Clase IV) / GE 5335919.

Los siguientes accesorios aprobados se embarcaron con el sistema:

- Accesorios para comodidad del paciente y para flujo de trabajo, como colchoneta de la camilla, extensión de la camilla, camilla para brazos del paciente, soportes para bolsas de catéter, bandeja y portasueros acoplado a la camilla.
- Accesorios para colocación del paciente, incluyendo los soportes de cabeza axial y coronal, cintas y almohadillas de colocación.
- Accesorios del sistema de aseguramiento de calidad, incluyendo los maniqués de imágenes y el soporte del maniquí.

Accesorios adicionales y suministros aprobados para utilizar con el sistema disponibles en www.GEhealthcare.com.

Revise todos los accesorios cada vez que los utilice y retire las piezas dañadas o agrietadas.

Condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del equipo.

Almacenamiento del sistema antes de la instalación:

Mantenga la temperatura de almacenaje entre 0 grados y +30 grados C (32 grados y 86 grados F)

Mantenga la humedad de almacenamiento sin condensación a menos de 70%. **NO** almacene el sistema durante más de 90 días

Presión de aire: Mantenga la presión de aire entre 750 y 1060hPa.

Especificaciones ambientales

Las clasificaciones y los ciclos de funcionamiento de todos los subsistemas se aplican si el entorno del centro cumple con lo siguiente.

El entorno especificado se debe mantener constantemente, durante los fines de semana, días festivos y la noche.

Apague el sistema de CT siempre que falle el aire acondicionado.

Maria Micucci
Gerada
Argentina S.A.
GE Healthcare

MARCELO SAMPSONI
CO-ORDINADOR TECNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Opcional: Apague el aire acondicionado cuando se apague el CT para reparaciones.

Requisitos de enfriamiento del sistema

Los requisitos de enfriamiento no incluyen enfriamiento debido a las luces de la sala o a la presencia de personal o equipo que no es para CT. Los requisitos de enfriamiento se enumeran por subsistema para permitir el planeamiento para cada cuarto de la sala de CT.

Se proporcionan los requisitos de enfriamiento para casos mínimos, recomendados y de ampliación aceptados.

- Los valores mínimos de enfriamiento asumen la exploración de 3 pacientes por hora y 75 rotaciones de exploración por paciente.
- Los requisitos de enfriamiento recomendados asumen que la cantidad de pacientes explorados está limitada por el algoritmo de enfriamiento del tubo.
- El enfriamiento de la sala se puede ajustar para desarrollos futuros usando los números para crecimiento aceptado. Este enfriamiento permitirá que se explore a más pacientes por hora y/o creará el potencial para mejoras al sistema en el futuro.

Especificaciones de temperatura y humedad

Temperatura ambiente

Sala de exploración

64° - 78° F (18° - 26° C) para la comodidad del paciente

Sala de control (incluyendo la Consola/ordenador)

64° - 78° F (18° - 26° C)

Mesa y estativo en la sala de examen (cuando la sala no está ocupada)

60° - 78° F (15° - 26° C)

Sala del equipo (si hay una sala separada para la PDU)

64° - 78° F (18° - 26° C)

Tasa de cambio

5°F/Hr Máx (3°C)

Uniformidad de la temperatura de la sala

5°F Gradiente máx (3°C)

Medios (discos/cintas)

Mantenga los medios de almacenamiento a largo plazo en el mismo rango de temperatura

que el ordenador, 60 - 75 F (15 - 26 C).

Humedad relativa (Todas las áreas)

- 30% - 60% (sin condensación) durante la operación, todas las áreas.
- Tasa de cambio del 5% RH/Hr Máx.

E

Maria M. Miodini
Gerada
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCO ANTONIO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



-14028

NOTA: Utilice un medidor de temperatura y humedad para vigilar el área designada del sistema durante la preinstalación y la instalación, para verificar las verdaderas condiciones temperatura y humedad.

NOTA: Consulte con su servicio de GE local para transporte y almacenaje del sistema.

NOTA: Antes del encendido del sistema, deberán mantenerse durante al menos 24 horas las condiciones operativas del ambiente de la sala que se encuentran en el capítulo de Especificaciones del sistema. Estas condiciones deberán ser mantenidas constantemente cuando el sistema esté alimentado y/o en uso.

Interferencias electromagnéticas

Consulte a GE Healthcare para obtener recomendaciones cuando el campo máximo de 60 Hz/50Hz dentro de la región del estativo exceda el máximo de 0,01 gauss.

Considere lo siguiente cuando trate de reducir la presunta Interferencia electromagnética (EMI):

- La fuerza del campo externo de una fuente de campo magnético disminuye rápidamente con la distancia de la fuente.
- Un banco de tres transformadores monofásicos genera un campo magnético más pequeño (menos fuga externa) que un transformador trifásico con una clasificación de potencia equivalente.
- Los motores eléctricos grandes generan una EMI importante.
- El refuerzo de acero en la estructura del edificio puede actuar como un conductor eficaz de EMI.
- Las señales de radio de alto poder pueden afectar los ordenadores.
- Nada puede sustituir el blindado apropiado de los cables y armarios.

Contaminación

Los componentes individuales contiene filtros para optimizar las condiciones del entorno.

- Mantenga la contaminación del aire a un nivel mínimo.
- Mantenga las salas de CT limpias en todo momento.
- No realice actividades que generen polvo y vapores cerca del sistema.
- Mantenga lo filtros limpios y sin obstrucciones

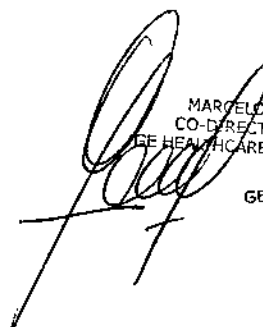
Instrucciones de uso

Este sistema fue diseñado para ser utilizado por operadores entrenados en la utilización de sistemas de CT. Lea con atención el capítulo de seguridad de este manual antes de explorar al primer paciente.


Modos de funcionamiento del sistema


Descripción general

- Reconocimiento


MARCELO GAROFALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.
MARCELO GAROFALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

5

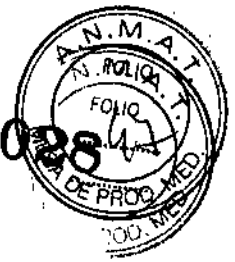
Mariana Micucci
Argentina S.A.
GE Healthcare



- Axial
- Helicoidal
- Helicoidal cardiaca
- Cine

Scout

Las imágenes scout se emplean para localización anatómica, junto con la prescripción de exploración y reconstrucción, para facilitar una referencia cruzada anatómica para imágenes axiales, y proporcionar una respuesta rápida al usuario con respecto a la región anatómica explorada. El modo de scout es compatible con las siguientes funciones y elementos:

- Reconstrucción en menos de 10 segundos.
- Los valores kV y mA existentes, según las limitaciones del generador y el tubo.
- Resolución de 0,9 mm en Z.
- Velocidad de la mesa 100 mm/seg.
- Datos adquiridos en modo 4 x 1.25 mm. Los algoritmos de reconstrucción "combinan" datos para mantener una resolución de 1,25 mm en Z.

Imagen pediátrica

Las técnicas y los protocolos de adultos no deben utilizarse con pacientes de menos de 2 años de edad.

Axial y cine

Para imágenes de oncología, los modos de exploración axial y cine continúan siendo los modos de adquisición practicados más comúnmente. Especialmente para el aparato respiratorio.

Las funciones de la imagen axial y de Cine incluyen:

- Los valores kV y mA existentes, según las limitaciones del generador y el tubo.
- Velocidad de exploración: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 segundos.
- Cine: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 segundos.
- Espesor de imagen variable.
- Cadencias de muestreo: 984 Hz, 1090Hz, 1230Hz, 1400Hz, 1640Hz, 1968Hz soportan exploraciones de 0,5 segundos.
- Opción de reconstrucción segmentada para las exploraciones de cine.

La Optima CT540 Series puede adquirir 16 cortes axiales en una única rotación. Estos cortes pueden reconstruirse de forma independiente para crear 16 imágenes, Estas imágenes pueden combinarse para crear imágenes compuestas. Por ejemplo:

Datos recopilados en modo de 16 x 1,25 mm.

(16i) 16 imágenes x 1,25 mm

(4i) 4 imágenes x 5.00 mm

E
Mariano Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.

[Signature]
MARTÍN CERROVALO
COORDINADOR TÉCNICO
DE HELICOIDALES ARGENTINA S.A.



(2i) 2 imágenes x 10.00 mm

Helicoidal

Presentación helicoidal

El detector de 24 filas y el DAS de 16 filas logran su rendimiento máximo en el modo helicoidal. En este modo, los datos de las 16 filas del detector se combinan y ponderan selectivamente durante la reconstrucción para obtener un equilibrio óptimo entre la resolución del eje Z de la imagen, el ruido y los artefactos helicoidales.

Las funciones de la exploración helicoidal incluyen:

- Los valores kV y mA existentes, según las limitaciones del generador y el tubo.
- El tiempo de exploración helicoidal máximo de 120 segundos.
- Pitch:

Optima CT540: 0.562:1, 0.938:1, 1.375:1, 1.75:1

- Espesor de imagen variable (parámetro de reconstrucción).
- Cadencias de muestreo: 984 Hz, 1090Hz, 1230Hz, 1400Hz, 1640Hz, 1968Hz
- Opción de reconstrucción segmentada.
- Espacio de imagen de reconstrucción retrospectiva incremental de 0,1 mm mínimo.

Una vez que la Optima CT540 Series haya adquirido los datos helicoidales, éstos pueden reconstruirse con un espesor de imagen mayor o igual a 1x el tamaño de la macrofila del detector. La calidad de imagen óptima (cercana a la calidad de imagen axial) se logra con un tamaño de la macrofila del detector 2x. El espesor de imagen más fino posible, el cual produce una imagen de una calidad ligeramente inferior con el pitch 1,5:1 en el HiSpeed CT/i, es del mismo tamaño 1x de la macrofila del detector.

Ejemplo helicoidal de calidad de imagen óptima

Una imagen de calidad óptima (cercana a la imagen axial) se logra del modo siguiente:

- Tamaño de la macrofila del detector = 50% del espesor de corte de imagen deseado.
- Pitch (desplazamiento de la mesa con respecto a la colimación del haz) = 0,625:1.
- Modo de 0.562:1
- Imagen de 5mm
- Modo de detector de 16x 0,625mm
- 5,625 mm/rotación

Presentación de la exploración cardiaca helicoidal

Una exploración helicoidal de pitch bajo para aplicaciones cardiacas junto con la opción CardiQ SnapShot. En este modo de exploración, el control del ritmo cardiaco se realiza durante la adquisición helicoidal y los datos de adquisición ECG asociados se almacenan con los datos de la exploración de manera que un algoritmo de reconstrucción SnapShot (Foto) de un impulso cardiaco sincronizado se puede aplicar a imágenes anteriores y a imágenes futuras. La reconstrucción SnapShot se utiliza para minimizar el movimiento

Maria Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.

RODRIGO GONZALEZ
COORDINADOR TECNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



14028

del corazón en las imágenes resultantes. En las exploraciones cardiacas helicoidales, el sistema determina el factor pitch, que es una función del ritmo cardiaco del paciente.

Las funciones de la imagen helicoidal cardiaca incluyen:

- Todos los valores kV y mA existentes, según las limitaciones del generador y el tubo.
- El tiempo de exploración helicoidal cardiaca máximo de 120 segundos.
- Pitch: determinados por el sistema, con un rango de 0,25 a 0,35, basados en el ritmo cardiaco del paciente. Un ritmo cardiaco más alto utilizará un factor de pitch más alto.
- Espesor de imagen variable sólo a través del parámetro de adquisición del espesor de corte (0,625, 1,25, 2,5, 3,75 y 5,0 mm). No existe ningún parámetro de reconstrucción del espesor de imagen disponible.
- Opciones de reconstrucción Segmento de Foto Burst y Burst+ y Segmentada (no sincronizada).
- Parámetro de emplazamiento de la fase cardiaca del 0 al 99% del ciclo R-a-R.
- Espacio de imagen de reconstrucción retrospectiva incremental de 0,1 mm mínimo.

Una vez que se hayan recopilado los datos de la exploración cardiaca helicoidal, se pueden reconstruir en emplazamientos arbitrarios de fases del ciclo cardiaco. La reconstrucción segmentada también está disponible de manera retrospectiva si no desea obtener imágenes no sincronizadas.

Modos de calibración

Las calibraciones de la Optima CT540 Series incluyen:

- Calibración de ganancia del eje Z
- Calentamiento del tubo
- Calibración del aire
- Calibración de maniquí
- Calibración del agua
- Comprobación de calibración IQ

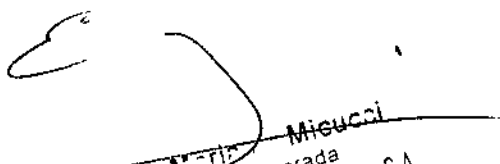
* = similar a HiSpeed, actualizada para una recopilación de datos de 16 filas

Encendido y apagado del sistema

Para que el rendimiento de su sistema operativo sea óptimo, es importante cerrar y reiniciar el sistema cada 24 horas.


1. En el área de selección del escritorio, seleccione **[Shutdown] (Cerrar)**.

- ♦ Aparece un cuadro con un mensaje de aviso.


M. Micucci
Gerada
GE Healthcare Argentina S.A.


MARCELO BAROFALDO
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

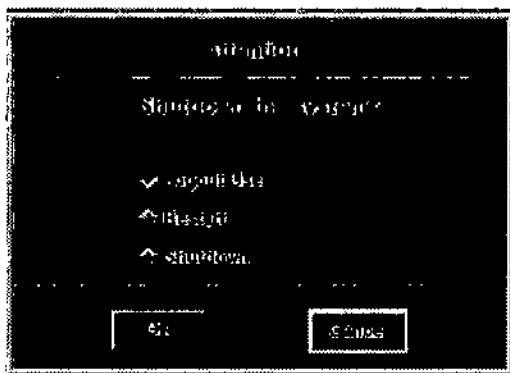14028



2. En este cuadro de diálogo, seleccione la opción que le interese si HIPAA está activado.

- ♦ **Logout User (Cerrar sesión usuario)** le permite volver a iniciar una sesión como un usuario diferente.

NOTA: para obtener información sobre cómo iniciar y cerrar una sesión, consulte: Iniciar y cerrar una sesión.

- ♦ **Restart (Reiniciar)** cierra por completo el programa del sistema y automáticamente reinicia el sistema.
- ♦ **Shutdown (Cerrar)** apaga por completo el sistema y muestra el indicador de apagado. Entonces podrá apagar el sistema.

3. Haga clic en **[OK] (Aceptar)**.

4. Si selecciona **Cerrar** o **Reiniciar** aparecerá una serie de menús y de mensajes.

- ♦ Si seleccionó **Restart (Reiniciar)** el sistema vuelve a arrancar automáticamente.

NOTA: El sistema tiene un software y un hardware instalados llamados SmartID. Este software verifica la ID del tubo al arranque. Si la ID del tubo no es correcta, aparece la pantalla mostrada a continuación. Aunque es posible seguir explorando, deberá llamar al técnico de servicio. Algunas funciones están desactivadas cuando no está instalado un tubo GE.

Si ha seleccionado **Shutdown (Cerrar)**, desconecte la alimentación si aún no se ha apagado con el interruptor de la parte frontal de la consola y vuelva a encenderlo para reiniciar el sistema.

– Espere dos minutos antes de reiniciar la energía tras una interrupción en la alimentación.

Pulse **[OK]**. 4. Si selecciona **Cerrar** o **Reiniciar** aparecerán una serie de menús y mensajes. 5.

Para encender el sistema, pulse el interruptor situado en la parte frontal de la consola del operador y el sistema arrancará automáticamente.

Iniciar y cerrar una sesión

La opción de acceso requiere que el usuario inicie sesión para obtener acceso al sistema y el administrador o ingeniero de campo puede activar o desactivar esta opción.

La manera en la que el sitio utiliza esta opción depende de si dicho sitio tiene un depósito de usuarios central al que el sistema se conecta. Los centros con redes son

M. r... M...
...erada
...
GE Healthcare

[Signature]
...
...
...
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

denominados sistemas empresariales y los centros sin redes se denominan sistemas independientes. Esta opción se puede utilizar con cualquier configuración, aunque algunas opciones son más aplicables a sistemas empresariales.


1. En la pantalla de inicio de sesión, introduzca el nombre de inicio de sesión asignado.
 § Este nombre se lo habrá asignado el administrador del sistema.

NOTA: únicamente en el caso de una emergencia, si necesita entrar rápidamente en el sistema seleccione [Emergency Login] (Iniciar sesión de emergencia).

NOTA: Al desconectarse, no se prohibirá el ingreso de otros usuarios. La desconexión está diseñada para proteger la privacidad del paciente y no para impedir el ingreso de los usuarios aprobados. Cuando usted u otro usuario vuelva a iniciar sesión, el sistema vuelve a su último estado conocido.

2. Sitúe el cursor en la casilla de Contraseña y escriba su contraseña.
3. Haga clic en [Login] (Iniciar sesión)

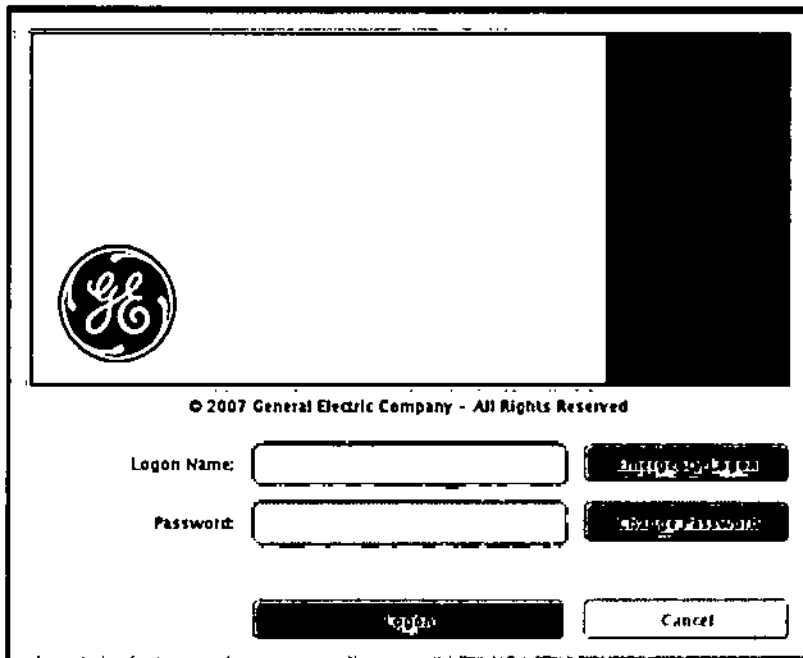Figura 5-24 Ventana de inicio de sesión




4. Para salir del sistema, pulse [Shutdown] (Cerrar).
Aparecerá la ventana Shutdown (Cerrar).
5. Haga clic en [Logout User] (Cerrar sesión de usuario).
6. Haga clic en [OK] (Aceptar).

En el menú desplegable Select User (Seleccionar usuario), seleccione su nombre de usuario.

Configure los usuarios locales

La segunda ficha en el componente de administración EA3 es la ficha de Usuarios locales.

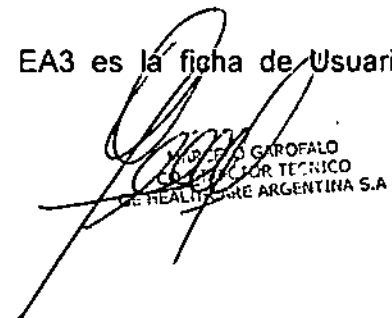
~~Maria Micucci
Gerada
GE HealthCare Argentina S.A.~~


MIGUEL GAROFALO
INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIONES
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

En esta ficha, puede agregar usuarios, eliminar usuarios, cambiar afiliaciones de grupos de usuarios, cambiar nombres de usuarios, cambiar contraseñas de usuarios, bloquear y desbloquear usuarios, obligar a usuarios a cambiar sus contraseñas en el próximo inicio de sesión, etc. A continuación se muestra una captura de pantalla de la ficha Usuarios locales del componente de administración EA3.

1. Seleccione la ficha Usuarios locales.

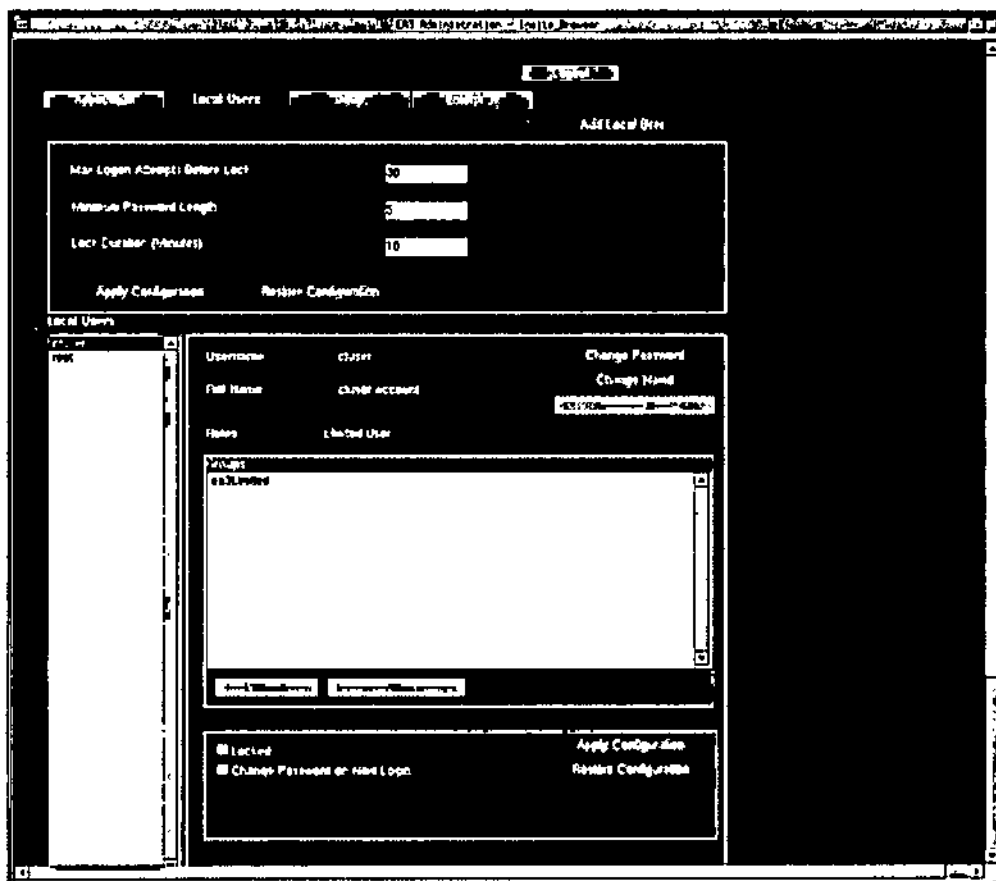Figura 5-29 Ficha Usuarios locales



2. Seleccione las opciones que desee.

- Max Logon Attempts Before Lock (Máximos intentos de inicio de sesión antes de bloquear la cuenta):** La cantidad de intentos de inicio de sesión fallidos que un usuario puede realizar antes de que se le bloquee la cuenta por una determinada cantidad de minutos. Cuando se bloquea una cuenta de usuario, dicho usuario no está autorizado a iniciar sesión, incluso si proporciona la combinación correcta de nombre de usuario y contraseña. Debe transcurrir el tiempo especificado antes de que el usuario pueda iniciar sesión o un usuario con rol ADMIN (administrador) debe iniciar sesión en el componente de administración EA3 para desbloquear al usuario.

Tenga presente que el bloqueo sólo se aplica a los usuarios locales (el servidor empresarial administra el bloqueo de usuarios empresariales).

- Minimum Password Length (Longitud mínima de la contraseña):** la longitud mínima de una contraseña nueva de un usuario. Tenga presente que si una contraseña ya está por debajo de la longitud mínima de la contraseña, establecer este valor no tendrá efecto sobre la contraseña. Por ejemplo, si su contraseña tiene 8 caracteres y alguien cambia la longitud mínima de la contraseña a 10 caracteres, la contraseña de 8 caracteres todavía servirá. Sin

embargo, la próxima vez que el usuario cambie la contraseña, deberá elegir una contraseña con 10 caracteres o más. Tenga presente que la longitud mínima de la contraseña sólo se aplica a los usuarios locales (el servidor empresarial administra las restricciones de longitud de la contraseña para usuarios empresariales).

- ♦ **Lock Duration (Duración del bloqueo) (minutos):** La cantidad de minutos que un usuario permanece bloqueado si se lo bloquea por intentos de inicio de sesión fallidos.
- ♦ **Apply Configuration (Aplicar configuración):** utilice el botón Apply Configuration para guardar los cambios.
- ♦ **Restore Configuration (Reestablecer configuración):** utilice este botón para eliminar cualquier cambio que no haya sido guardado aún. Si se produce algún error, aparecerá un recuadro emergente que describe el error. Si es exitoso, verá que aparece una etiqueta verde con información de confirmación.

NOTA: Se bloquea a los usuarios de una de dos maneras.

- ♦ El usuario ingresa demasiadas contraseñas incorrectas. En este caso, se bloqueará al usuario por una determinada cantidad de tiempo, incluso con una contraseña correcta. Una vez transcurrido el tiempo, el usuario puede volver a intentar iniciar sesión. Un administrador puede desbloquear a este usuario antes de que termine la duración del bloqueo desactivando Locked (bloqueado) en la ficha Usuario local cuando selecciona al usuario.
- ♦ El administrador puede bloquear la cuenta del usuario forzosamente. En este caso, la duración del bloqueo no se aplica a un usuario que ha sido bloqueado forzosamente por un administrador. Permanece bloqueado hasta que el administrador lo desbloquee.

3. Haga clic en **[Apply Configurations] (Aplicar configuraciones)**.

Configure los usuarios locales

Agregar un usuario local

Una vez que se agrega un usuario, se resalta automáticamente en la casilla de la lista Usuarios locales en el sitio izquierdo, y está "en contexto". Una vez que un usuario está en contexto, toda la información y los botones en el panel central (es decir, nombre de usuario, nombre completo, roles, cambiar nombre, cambiar contraseña, eliminar usuario, casilla de lista de grupos, botón agregar a grupos y botón eliminar de grupos) hacen referencia a dicho usuario.

1. Haga clic en **[Add Local User] (Agregar usuario local)**.

- ♦ Cuando se hace clic en este botón, se muestra un panel emergente.
2. Escriba la nueva **ID de usuario** (debe ser única).
 3. Escriba un **nombre completo**.
 4. Escriba una **contraseña**.
 5. Escriba la **confirmación de contraseña**.
 6. Haga clic en **[Add User] (Agregar usuario)**.

E

Micucci
Gerada
GE Healthcare Argentina S.A.



MARCELO GARORALO
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Pasos rápidos: Cambie la contraseña de un usuario

1. Seleccione Usuario.
2. Haga clic en [Change] (Cambiar).
3. Realice los cambios en la contraseña.
4. Haga clic en [Confirm Change] (Confirmar cambio).

Pasos rápidos: Cambie el nombre completo de un usuario.

1. Seleccione el usuario.
2. Haga clic en [Change Name] (Cambiar nombre).
3. Realice los cambios en el nombre.
4. Haga clic en [Confirm Change] (Confirmar cambio).

Pasos rápidos: Eliminar usuarios

1. Seleccione el usuario.
2. Haga clic en [Remove User] (Eliminar usuario).
3. Haga clic en [Confirm Removal] (Confirmar eliminación).

Pasos rápidos: Agregue o elimine un usuario de un grupo

1. Haga clic en [Add To Groups] (Agregar a grupos) o haga clic en [Remove From Groups] (Eliminar de grupos).
2. Haga clic en [Add Membership] (Agregar afiliación) o haga clic en [Remove Membership] (Eliminar afiliación).


Configure grupos

La tercera ficha en el componente de administración EA3 es la ficha de Grupos. En esta ficha, puede agregar grupos locales, agregar grupos empresariales, eliminar grupos locales, eliminar grupos empresariales, cambiar roles de grupos y cambiar afiliaciones de grupos.


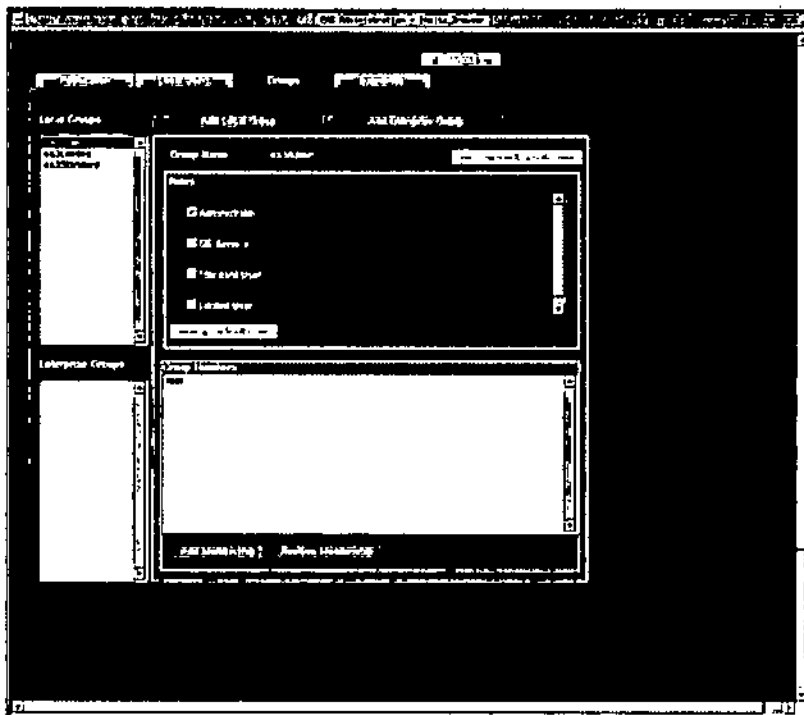
1. Haga clic en [Groups] (Grupos).

Figura 5-36 Ventana de grupos


Mariana Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.


MARCELO GAROFALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

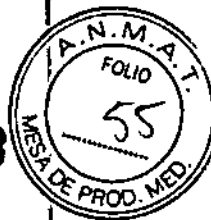1.4028



Configure grupos

Agregar un grupo empresarial

Agregar un grupo empresarial es bastante similar a agregar un grupo local.

1. Haga clic en **[Add Enterprise Group]** (Agregar grupo empresarial).

- Cuando se hace clic en este botón, se muestra un panel emergente.

2. Escriba el nuevo nombre de grupo (debe ser único).

- Si se encuentra cualquier error, recibirá una casilla de mensaje de error. Si recibe la casilla de mensaje de error quiere decir que los cambios no se guardaron en la base de datos. Puede corregir los errores y volver a intentar. Los posibles errores que se pueden encontrar cuando se agrega un grupo son:

- El nombre de grupo ya existe en la base de datos.
- Desconexión por inactividad de la sesión de la aplicación

3. Haga clic en **[Add Local Group]** (Agregar grupo local).

- Agregar un grupo empresarial no agrega en realidad un grupo al servidor de directorio Enterprise. Lo que hace es darle a EA3 la capacidad de administrar roles para ese grupo, que ya deberían existir en el servidor de directorio Enterprise. Así, por ejemplo, si agrega un grupo 'All Employees' (Todos empleados) como un grupo empresarial a EA3, y asigna ese grupo con un rol ESTÁNDAR, entonces cualquier usuario empresarial que inicie sesión a través de EA3 y que pertenezca al grupo 'All Employees' tendrá un rol ESTÁNDAR.

- No puede administrar las asignaciones de grupos empresariales. El servidor de directorio administra esto, no EA3. Por lo tanto, cuando un grupo empresarial está en contexto, los botones 'Add Membership' (Agregar afiliaciones) y 'Remove Membership' (Eliminar afiliaciones) estarán bloqueados. Esto no significa que nadie pertenezca a los

Mario Micucci
Gerente General
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO BUSTOS
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



14028

grupos empresariales, simplemente significa que el servidor de directorio administra esto y no EA3.

- ♦ Una vez que se agrega un grupo empresarial, se resalta automáticamente en la casilla de la lista Grupos empresariales en el sitio izquierdo, y está "en contexto". Una vez que un grupo está en contexto, toda la información y los botones en el panel central (es decir, nombre de grupo, botón eliminar grupo, casillas de verificación de roles, botón aplicar roles, casilla de lista de miembros de grupo) hacen referencia a dicho grupo.

Administre un grupo

Puede seleccionar un grupo para resaltar haciendo clic en el nombre del grupo en la casilla de lista 'Local Groups' (Grupos locales) o la 'Enterprise Groups' (Grupos empresariales) en la izquierda. Sólo un grupo puede estar resaltado a la vez. Si intenta elegir varios grupos, EA3 seleccionará automáticamente el grupo superior que esté seleccionado. Una vez que un grupo esté resaltado, puede hacer todas las modificaciones necesarias a ese grupo.

NOTA: Cuando navega por primera vez a la ficha Grupos, EA3 colocará de manera automática al primer grupo local resaltado en la lista. Si no hay grupos locales, entonces EA3 colocará de manera automática el primer grupo empresarial resaltado en la lista. Si no hay grupos locales ni grupos empresariales, entonces no habrá ningún grupo resaltado y todos los botones en el panel central se desactivarán hasta que se agregue un grupo.

Eliminar un grupo

1. Una vez que un grupo esté resaltado, haga clic en **[Remove Group]** (Eliminar grupo).
 - ♦ A continuación aparece un panel emergente que le solicita que confirme la eliminación del grupo.
2. Si desea eliminar el grupo, haga clic en **[Confirm Removal]** (Confirmar eliminación).
 - ♦ Si no desea realizar los cambios, simplemente haga clic en **Cancel** (Cancelar).

Configure la ficha Enterprise (Empresa)

La última ficha en el componente de administración EA3 es la ficha de empresa. En esta ficha, puede configurar las propiedades necesarias para realizar una conexión a un servidor de directorio empresarial (es decir, MSAD, Novell, etc.).

La ficha Enterprise (Empresa) es utilizada por el personal de informática o de Servicio GE del sitio. Permite conectarse con la base de datos de usuarios del centro. Si no tiene una red configurada en el hospital o clínica, esta ficha no se utilizará.

Consideraciones.

- ♦ Utilice la capacidad empresarial siempre que sea posible.
- ♦ Asegúrese de que los grupos empresariales son lo suficientemente granulares para restringir el acceso de edición de protocolos.
- ♦ El plazo de inactividad debe desactivarse.

1. Haga clic en **[Enterprise]** (Empresa).

MARCELO GONZALEZ
COORDINADOR TECNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Mario Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.



EA3 Administration - Insite Browser

Application Local Users Groups Enterprise

Enable Enterprise Authentication Apply Configuration Restore Configuration

Cache Enterprise Users

Enterprise Authentication Latency (Seconds) 10

Configuration instructions

Step 0: Attempt to auto-detect the Server Name. Auto-detection will not work on all systems. Manually configuring the Server Name can be done in the next step.

Auto-detect Server Name

Step 1: Enter the Server Name / IP and the authentication type (at right). Click "Test Connection".

Test Connection

Step 2: Choose the Server Type from the drop-downs (at right). Click "Generate Defaults".

Generate Defaults

Step 3: Make any necessary modifications to the default configuration.

Step 4: Attempt to login with your username/password to the Server.

Username Login Password

Step 5: Confirm there were no errors, and your correct name and group membership was returned.

Login Results

Server Configuration

Server Name / IP Authentication Type Kerberos Use SSL Server Type Microsoft Active Directory Realm Name

LDAP Configuration

Format domain DN Login Attribute First Name Attribute Last Name Attribute Group Attribute

Apply Configuration Restore Configuration

Las siguientes configuraciones se pueden hacer en la casilla superior de esta ficha:

Enable Enterprise Authentication (Activar autenticación empresarial): para determinar si los usuarios empresariales deben estar habilitados para iniciar sesión. Si no está marcada, sólo los usuarios locales EA3 podrán iniciar sesión. Si está marcada, tanto los usuarios locales como los usuarios empresariales EA3 podrán iniciar sesión (aunque siempre se intentará primero con la base de datos de usuario local EA3).

Cache Enterprise Users (Guardar usuarios empresariales en caché): para determinar si se deberían guardar en caché a los usuarios una vez que hayan iniciado sesión exitosamente. Si está marcada, se mantiene un registro local del usuario de una empresa. Si en cualquier momento dicho usuario intenta iniciar sesión nuevamente, y por algún motivo el servidor de directorio empresarial no está disponible (es decir, problemas de red), se le otorgará acceso a este usuario si proporciona la contraseña correcta. Si no está marcada, se le negará el acceso al usuario empresa si no se puede conectar al servidor de directorio empresarial. Tenga presente que las contraseñas criptográficas se guardan en caché, la contraseña real no se guarda en caché.

Enterprise Authentication Latency (Latencia de autenticación empresarial) (segundos): la cantidad de tiempo (en segundos) que el proceso de inicio de sesión EA3 debe esperar una respuesta del servidor de directorio empresarial. Muchas veces, existe una latencia de red cuando se está conectando a servidores y será diferente en las

Maria Micucci
Gerada
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GONZALEZ
COORDINADOR TECNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

-14028



distintas configuraciones de red. Si se alcanza la cantidad de tiempo sin una respuesta del servidor de directorio, el proceso de inicio de sesión de EA3 devolverá un inicio de sesión fallido. Un valor de 5 segundos debe ser un tiempo suficiente para permitir que un servidor de directorio correctamente configurado responda sin ser una gran molestia para el usuario si el servidor de directorio no funciona (es decir, sólo tendrá que esperar un máximo de 5 segundos para que aparezca el intento de inicio de sesión).

La aplicación de cambios de configuración en la casilla superior de la ficha empresa es lo mismo que se mencionó anteriormente para la ficha Aplicación. Utilice el botón Apply Configuration (Aplicar configuración) para guardar los cambios y el botón Restore Configuration (Reestablecer configuración) para deshacer cualquier cambio que no se haya guardado todavía. Si se produce algún error, aparecerá un recuadro emergente que describe el error.

Además, en esta ficha se puede realizar la conexión real al servidor de directorio empresarial. Modificará propiedades en las dos casillas inferiores de la ficha de empresa.

Pasos rápidos: Auto Configuration (Configuración automática)

1. Haga clic en [Auto-detect Server Name] (Detectar automáticamente el nombre de servidor).
2. En la casilla Configuración de servidor escriba el nombre de servidor o la dirección IP del servidor de directorio empresarial a la que EA3 debe conectarse.
3. Elija el tipo de autenticación que el servidor de directorio admite.
4. Haga clic en [Test Connection] (Probar conexión).
5. Seleccione el tipo de servidor de directorio (Microsoft Active Directory, Novell eDirectory u otro).
6. Haga clic en el botón [Generate Defaults] (Generar valores predeterminados).
7. Escriba un nombre de usuario y una contraseña de un usuario que resida en el servidor de directorio.
8. Haga clic en [Login] (Iniciar sesión).
9. Haga clic en [Apply Configuration] (Aplicar configuración).

Utilizar IQ Snap (Toma de IQ)

IQ Snap permite reservar los archivos de datos de exploración correspondientes a imágenes con problemas de calidad para una investigación más profunda.

La cantidad máxima de imágenes que se pueden seleccionar para IQ Snap es de 500. Todas las imágenes deben formar parte de la misma serie. Si hay problemas de calidad en más de una serie, cada serie debe elaborarse por separado.

Los archivos de datos de exploración correspondientes se reservarán para las imágenes del examen anónimo. Puede verificar que se hayan reservado los datos de exploración seleccionando Recon Mgnt (Gestión de reconstrucciones), después seleccione Release Scan Data (Liberar datos de exploración). Para el modo Helicoidal, los datos de exploración reservados son para el grupo o para explorar el grupo relacionado con las imágenes. Para el modo Axial, los datos de exploración reservados serán la rotación axial correspondiente a las imágenes. También para el modo Axial, se recomienda

M. J. M. J. M.
Gerada
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GARCÍA
CO-DIRECTOR
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

-14028




seleccionar un grupo de imágenes en cada lado de la imagen donde se observe un problema de calidad para asegurarse de que los datos de exploración estarán disponibles posteriormente.

1. Seleccione las imágenes que desea guardar en los archivos de datos de exploración en el Browser (Explorador) del escritorio Image Works.
2. Haga anónima una serie o un conjunto de imágenes anónimas para la serie que tenga problemas de IQ.

Si las imágenes seleccionadas no son anónimas, aparecerá una ventana emergente indicando al usuario que transforme la información en datos anónimos.

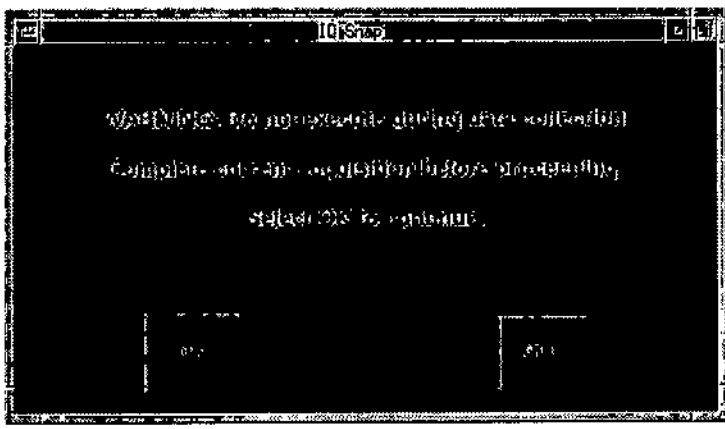
Figura 5-44



3. Seleccione los exámenes anónimos en el explorador.
Si selecciona por examen o serie sólo se guardará la primera imagen de la lista. En Anonymous Exam (Examen anónimo) resalte todas las imágenes para que estén disponibles y se pueda investigar el problema.

4. Haga clic en [IQ Snap] (Toma de IQ) en la barra de herramientas de Image Works. La ventana desplegable de IQ Snap aparece en el monitor izquierdo.

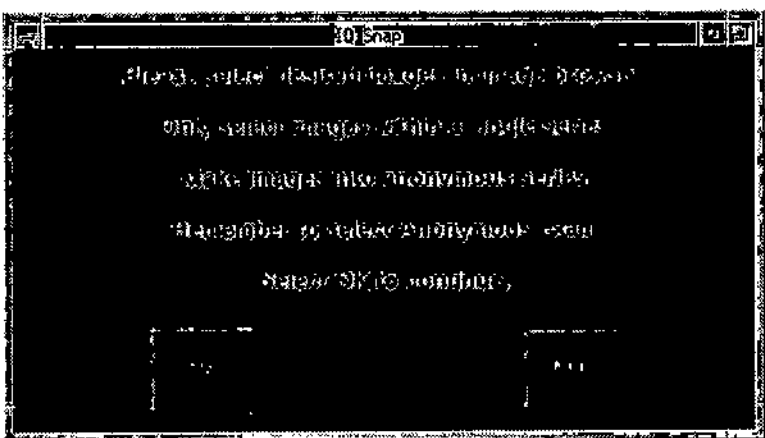Figura 5-46 Ventana desplegable de IQ Snap



5. Haga clic en [OK] (Aceptar).

Utilizar paciente anónimo (Nivel de paciente Level) (Nivel)

E

Maria Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GARIBALDO
INGENIERO EN SISTEMAS TÉCNICO
GENERAL HEALTH CARE ARGENTINA S.A.

- 14028



Seleccionar Anon Pat. Level (Nivel de paciente anónimo) permite cambiar el nivel de anotaciones de modo parcial y total para los pacientes anónimos por examen, serie o imagen en las utilidades del navegador en el escritorio Image Works.

Tabla 5-14 Modos Completo o parcial

Campo	Modo completo	Modo parcial
Número de examen	ANON o ANÓNIMO	ANON o ANÓNIMO
Identificación del paciente	ANON o ANÓNIMO	ANON o ANÓNIMO
Nombre del paciente,	ANON o ANÓNIMO	ANON o ANÓNIMO
Descripción del examen	ANON o ANÓNIMO	Mostrado
Descripción de la serie	ANON o ANÓNIMO	Mostrado
Fecha de nacimiento	Eliminado	Eliminado
Age (Edad)	Eliminado	Eliminado
Weight (Peso)	Eliminado	Eliminado
Operator Name (Nombre del operador)	Eliminado	Eliminado
Nombre del centro	Eliminado	Mostrado
Sex (Sexo)	Vacío	Vacío
Médico General	Vacío	Vacío
Número de adhesión	Vacío	Vacío

El modo Total es el que más se ajusta a la normativa HIPAA (Ley de portabilidad y responsabilidad del seguro de salud).

Las imágenes de guardar pantalla, por ejemplo, páginas de texto de serie o examen o páginas de texto del informes de dosis no se hacen anónimas.

1. Haga clic en [Anon. Pat. Level] (Nivel de paciente anónimo).

Al seleccionar Anon Pat (Nivel de paciente anónimo) en la barra de herramientas de Image Works, se mostrará uno de estos dos mensajes dependiendo del modo seleccionado para el software en ese momento.

2. Haga clic en [OK] (Aceptar) para cambiar de Full Level (Nivel completo) a Partial Level (Nivel parcial).

Haga clic en [Cancel] (Cancelar) para mantenerse en el nivel de anónimo completo.

3. Haga clic en [OK] (Aceptar) para cambiar de nivel parcial a nivel completo.


Haga clic en [Cancel] (Cancelar) para mantenerse en el nivel de anónimo parcial.

C.

Maria Micucci
Gerente de Marketing
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
COORDINADOR DE ENTRENAMIENTO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

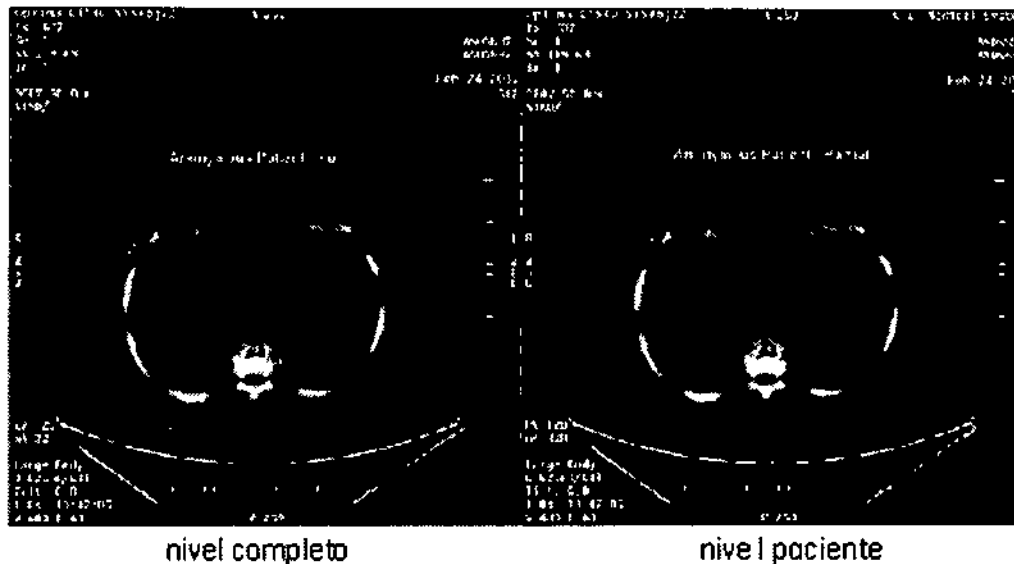Figura 5-49 Ejemplos de imágenes



Instalación

CUIDADO: El sistema debe ser instalado por las personas cualificadas designadas por el fabricante. Para asegurar una instalación correcta del equipo, póngase en contacto con su representante técnico local de GE Healthcare.

NOTA: Encontrará las instrucciones de instalación en el Manual de preinstalación e instalación incluido con el equipo.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL:

Para reducir los riesgos de interferencia, se deben cumplir los siguientes requisitos:

5.1 Cables blindados y conexión a tierra Todos los cables de interconexión con dispositivos periféricos deben estar revestidos y adecuadamente conectados a tierra. El uso de cables que no están debidamente blindados o conectados a tierra puede hacer que el equipo produzca interferencias de radiofrecuencia.

5.2. Este producto cumple con la emisión radiada de acuerdo a los límites estándar del CISPR11 Grupo 1 Clase A.

El sistema Optima CT540 Series, está principalmente preparado para usarse en ambientes no domésticos, y no directamente conectados a la red pública principal. El sistema Optima CT540 Series está en su mayoría diseñado para ser utilizado (por ejemplo en hospitales) con un sistema de suministro dedicado y una sala protegida contra los rayos X. En caso de utilizar un entorno doméstico (por ejemplo consultorios médicos), para evitar interferencias, se recomienda utilizar un panel y línea de distribución de alimentación de CA independiente, así como también una sala de rayos X protegida.

5.3. Subsistema y accesorios de la distribución de alimentación de energía:

Todos los componentes, subsistemas de accesorios y sistemas que se encuentran conectados eléctricamente al sistema Optima CT540 Series, deben contar con

Maria Micucci
Gerente de Ventas
GE Healthcare Argentina S.A.

Manuel C. Profalo
Ingeniero Técnico
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

alimentación por CA a través de la misma línea y el mismo panel de distribución de alimentación.

5.4. Equipo y componentes superpuestos:

El sistema Optima CT540 Series no se debe utilizar de manera adyacente a o superpuesta con otro equipo; en caso de que sea necesario utilizarlo de manera adyacente o superpuesta, se deberá observar el sistema a fin de verificar su normal funcionamiento en la configuración en la cual se utilizará.

5.5. Campo magnético de baja frecuencia

En el caso de un sistema Optima CT540 Series, el estativo (detector digital) debe colocarse a 1 metro del armario del generador y a 1 metro de los monitores analógicos (CRT). Estas especificaciones para las distancias reducirán el riesgo de interferencia del campo magnético de baja frecuencia.

5.6. Límites del campo magnético estático:

Para evitar interferencias en el sistema Optima CT540 Series, se especifican los límites del campo estático proveniente del entorno circundante.

El campo estático se especifica a menos de <1 Gauss en la sala de exámenes, y en el área de control. El campo estático se especifica a menos de <3 Gauss en la sala técnica.

5.7. Recomendaciones y entorno de descargas electrostáticas:

Para reducir la interferencia de descarga electrostática, instale un material para pisos que disipe la carga a fin de evitar la acumulación de la carga electrostática.

La humedad relativa sería de al menos el 30 por ciento.

El material de disipación deberá estar conectado a la referencia de conexión a tierra del sistema, si corresponde.

Exploración de pacientes pediátricos y pequeños

Las membranas se llenan y se inicia la medición. Las dos ondas se visualizan en la pantalla. GE Medical Systems recomienda enfáticamente reducir la dosis de radiación al nivel más bajo posible razonable (ALARA) EN todos los pacientes, especialmente los pediátricos y los pequeños, cada vez que se considere necesaria una tomografía computarizada. La CT es una herramienta extremadamente valiosa para diagnosticar lesiones y enfermedades, pero su uso no está exento de riesgos. Este capítulo analiza la importancia de minimizar la dosis de radiación en pacientes pequeños, conforme al principio ALARA.

Uso pediátrico - La exposición a la radiación constituye una preocupación tanto para adultos como para niños. Sin embargo, los niños son más sensibles a la radiación que los adultos y tienen una mayor esperanza de vida. Si se utilizan los mismos parámetros de exposición de un adulto en un niño, es posible que se apliquen al niño dosis superiores a las necesarias. No hay necesidad de aplicar dosis tan grandes a los niños, por lo que la configuración del CT se puede ajustar para reducir las dosis de manera significativa, manteniendo la calidad diagnóstica de la imagen. El Instituto nacional del cáncer y la Sociedad de radiología pediátrica desarrollaron un folleto llamado Riesgos de la radiación y tomografía computarizada pediátrica. Una guía para los especialistas en cuidado de la salud y la FDA estadounidense emitieron una notificación de salud pública, sobre *reducción del riesgo de radiación de la tomografía computarizada en niños y en*

Mario Micucci
Gerente General
GE Healthcare Argentina S.A.

ROBERTO BAROVALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

14028

pacientes pequeños fechada en noviembre 2 de 2001, que expone el valor de la CT y la importancia de minimizar la dosis de radiación, especialmente en los niños. Se puede acceder a estos documentos en <http://www.fda.gov/cdrh/ct/>.

Sensibilidad a la exposición a la radiación

La exposición a la radiación es un tema de incumbencia en las personas de todas las edades; sin embargo, la pediatría es más sensible a la exposición a la radiación. El riesgo de radiación es mayor en los jóvenes ya que tienen células que se dividen más rápidamente que los adultos. Cuanto más joven es el paciente, más sensible es.

Consideraciones de informes de dosis

Se comprende y acepta ampliamente que las técnicas para adultos nunca deben aplicarse a pacientes pequeños o pediátricos ya que los objetos más pequeños reciben una dosis mayor con la misma técnica. Figura 4-1 ilustra los abruptos aumentos en la dosis relativa a medida que la parte explorada se reduce en tamaño mediante el uso de la misma técnica.

Otra consideración acerca de la dosis es que al no ser posible caracterizar la dosis administrada a cada paciente individual, se proporcionan los índices de dosis de CT para facilitar la realización de comparaciones relativas. Estos valores de índice de dosis se pueden usar para comparar los sistemas de CT y para ayudarle a escoger condiciones de funcionamiento para la exploración. Sin embargo, es importante reconocer que la dosis reportada por estos índices es inversamente proporcional al tamaño de los maniqués (Ver Figura 4-1). Esto significa que para la misma técnica de exploración, los maniqués más pequeños (pacientes) producirán una dosis absorbida mayor que los maniqués más grandes (pacientes). Por lo tanto, es fundamental recordar que el filtro del cuerpo usa el maniquí de 32 cm de dosis de TC (CTDI) y el filtro de la cabeza usa el maniquí de 16 cm de dosis de TC (CTDI) a los fines de los informes de dosis (CTDI_{vol} mostrada en el área de Información de Dosis en la pantalla ViewEdit (Ver/Editar). Tabla 4-1 indica el tamaño del maniquí utilizado para calcular la dosis para cada campo de visión de exploración (SFOV).

Es decir, cuando se observe la dosis real absorbida por el paciente, recuerde que la dosis puede ser mayor que la informada si la parte explorada es más pequeña que el maniquí sometido a prueba. Tenga esto presente cuando ajuste los parámetros de exploración para adaptarlos a los pacientes que son más pequeños que los maniqués sometidos a prueba.

Figura 4-1 La relación entre la dosis y el tamaño del maniquí para los filtros de cabeza y cuerpo a 120kV. Se obtienen curvas similares para los valores de 80, 100 y 140 kVs.

M. Micucci
Parada
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

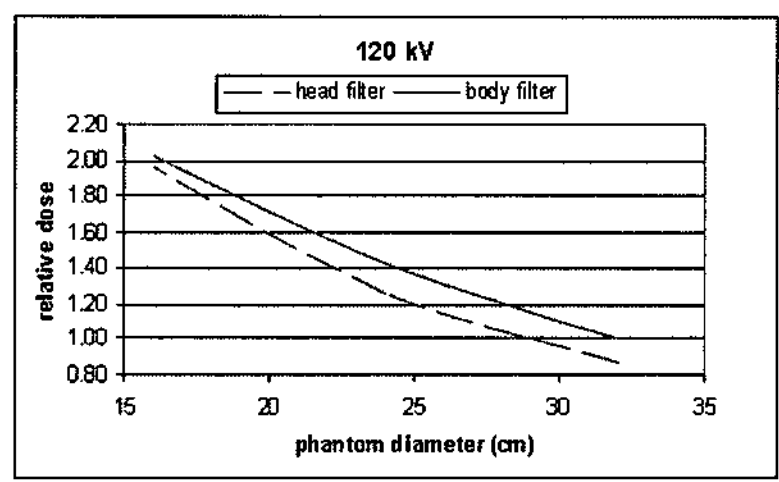


Tabla 4-1 Informe de dosis usada en el maniquí CTDI en función del tipo de SFOV

Tipo de SFOV	Maniquí CTDI
Cabeza pediátrica	Maniquí de 16 cm
Cabeza	
Pequeña	
Grande	Maniquí de 32 cm

Sugerencias para minimizar una dosis innecesaria

Todos comparten la responsabilidad de minimizar la dosis de radiación de CT. Se pueden tomar varias medidas para reducir la cantidad de radiación que los pacientes pediátricos y pequeños reciben por los exámenes de CT.

Realice sólo los exámenes de CT necesarios

¿Es la CT el estudio más apropiado? Esta importante comunicación entre el médico y el radiólogo del paciente es esencial para determinar la necesidad de un examen de CT. Las indicaciones y la técnica apropiada que se utilizará debe ser revisada por el radiólogo antes de cada exploración, por ejemplo el número de exploraciones previas del paciente, las razones para la exploración y la consideración de otras modalidades efectivas de dosis más bajas. En todos los casos, los beneficios esperados de la exploración siempre deben exceder el riesgo general.

Explore sólo el órgano o la región anatómica indicada

La cobertura de la exploración debe limitarse solamente al órgano o región anatómica del cuerpo indicada para evitar una exposición innecesaria.

Minimice los exámenes de CT de contraste de fase múltiple

Si es posible, explore sólo una serie. Los estudios de CT con y sin material de contraste no siempre son necesarios. La exploración de fase múltiple puede duplicar o triplicar la dosis y es posible que no proporcione información diagnóstica al estudio. Si se necesitan estudios de fase múltiple, use técnicas de dosis más bajas para las series sin contraste en comparación con las series con contraste y limite la exploración solamente al órgano o región anatómica indicada.

Centre adecuadamente a los pacientes en el estativo

M. Micucci
Gerente
Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

-14028



Esto permitirá que los filtros de pajarita (bowtie) lleven la dosis hacia donde se necesita y filtren más donde no se necesita. Esto es especialmente importante cuando se usan técnicas de control automático de la exposición como AutomA y SmartmA para reducir aún más la exposición innecesaria a la radiación. Los pacientes que no son centrados adecuadamente pueden ser expuestos a un nivel escaso o excesivo de radiación si la altura de la mesa es demasiado elevada o demasiado baja.

Valores mA reducidos para exploración del tórax o de los huesos

Es necesario tener en cuenta un valor mA más bajo e índices de ruido más altos si se usa AutomA para las imágenes musculoesqueléticas y de tórax/pulmones. Las imágenes de más alta resolución/dosis son generalmente innecesarias para estos tipos de estudios o para aquellos en los que hay un alto contraste inherente entre las estructuras que están siendo exploradas.

Explorar la relación señal-ruido

Limite las imágenes de más alta calidad que requieren la dosis de radiación más alta a indicaciones muy específicas tales como angiografías o la visualización de pequeñas lesiones sutiles. Los estudios con mayor ruido pueden ser sólo diagnósticos y requieren dosis más bajas.

Considere el uso de escudos de bismuto en el plano

Estudios recientes han demostrado reducciones de dosis para órganos sensibles, como el tejido mamario en las mujeres, la tiroides y los ojos sin afectar significativamente la calidad de la imagen. Si se usan con AutomA, deben establecerse después de obtener las exploraciones de reconocimiento a fin de reducir la sobrecompensación de la técnica. El escudo de bismuto en el plano no se debe utilizar durante las CTs que se van a usar en una corrección PET de atenuación.

Use accesorios para el posicionamiento del paciente pediátrico

Si es necesario, las tablas cuna o inmovilizadores neonatales pueden ser útiles para ciertos pacientes. Estos accesorios suelen ser convenientes para asegurar y mantener al paciente quieto, lo que minimiza la repetición de los exámenes y las dosis a causa del movimiento del paciente.

Prepare un ambiente agradable para el niño

Ilustraciones de animales en la pared o el cielorraso, animales de peluche y juegos son todas maneras eficaces de ayudar a los pacientes pediátricos y pequeños a calmar su temor. En función de su edad, explique al niño el procedimiento para que sepa qué esperar cuando ingresa a la sala de exploración. Esto facilitará la colaboración del paciente y teóricamente reducirá los estudios y la dosis a causa del movimiento del paciente.

Pautas para ajustar los parámetros individuales de exposición por paciente

Ajuste los parámetros en función de tamaño, edad, peso, altura e indicaciones

Lo más importante que debe hacer es siempre usar los protocolos pediátricos en función de la edad, el peso, la altura y las indicaciones para evitar la sobreexposición. Los protocolos pediátricos recomendados codificados por colores se instalan en el sistema y se organizan por colores de acuerdo con la altura y el peso para una selección más sencilla. Estos protocolos deben considerarse como un valor basal y le recomendamos que trabaje con su radiólogo y médico para determinar la dosis más baja posible para la

M. Micossi
Asesor Técnico
GE Healthcare Argentina S.A.

MICHELLE BAROFALO
Asesor Técnico
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



calidad de imagen deseada. También tenga en cuenta el diámetro de la parte que se debe explorar como una última consideración antes de la exploración. Por ejemplo, la parte puede ser más pequeña o más grande de lo que el peso del paciente indica.

Kilovoltaje más bajo

Considere disminuir el kilovoltaje a 80 o 100kVp para los pacientes más pequeños. Se pueden obtener disminuciones significativas en la dosis con selecciones de kVp más bajas, pero las disminuciones en kVp no deben llevarse a cabo sin aumentar los mA a fin de mantener los niveles de ruido y la relación contraste a ruido. Las selecciones de kV más bajo también aumentan los valores de las unidades Hounsfield (HU) por lo que el ancho de la ventana para visualizar las imágenes deberá aumentarse para mantener una apariencia similar. Dado que selecciones de kVp más bajas disminuyen la penetración de rayos X, es importante no utilizar selecciones kV bajas en pacientes de gran tamaño, lo que potencialmente puede dar lugar a una calidad de imagen comprometida. Trabaje con su radiólogo y médico para establecer protocolos de bajo kV y límites de tamaño de pacientes.

Tabla 4-2 y Tabla 4-3 puede usarse como guía para hacer ajustes a los mAs para cambios en un protocolo de kV.

Tabla 4-2 Factores de ajuste de los kV y mAs

Factor de ajuste de los KV				
kV	80	100	120	140
Factor	0.3	0.6	1.0	1.4
FACTORES DE AJUSTE DE LOS mA = Rx mA * Rx tiempo de rotación única en segundos/ 260				

NOTA: Los factores de ajuste de los kV y mA se estiman mediante el uso de una dosis de 100 del Índice de dosis de CT (CTDI).

Por ejemplo, si mantiene todo constante con una técnica de 120kv a 150mA, obtendría:

100kV a 190mA

80kV a 250mA


140kV a 95mA

Figura 4-2

Maria... Micucci
Gerada
S.A.

MARCELO GAROFALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

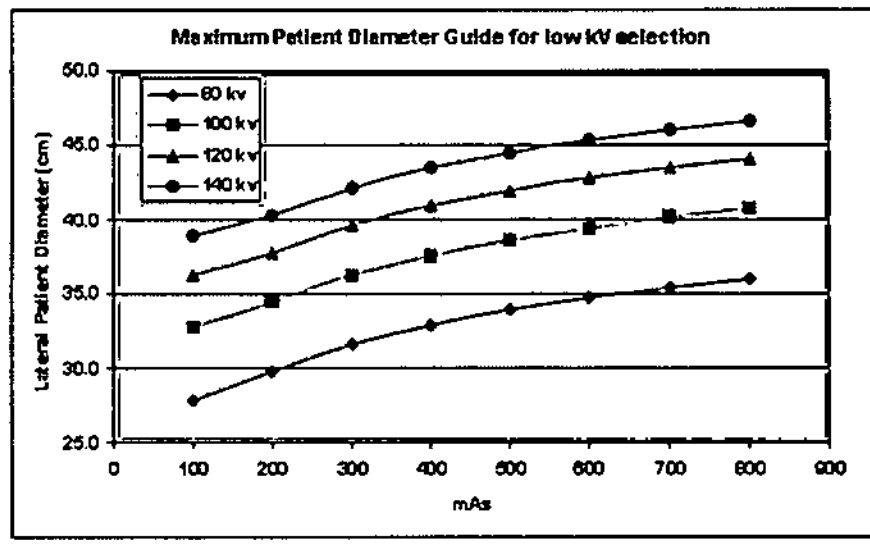14028



Para garantizar una penetración suficiente de rayos X, la finalidad de este gráfico es servir como guía relativa al diámetro máximo del paciente que puede ser explorado en función de una selección de los kV y mAs. No indica un factor de la técnica recomendado (que generalmente es más alto) ya que el factor de la técnica también depende de la calidad de imagen que se necesita para la tarea de diagnóstico.

AutomA

Si usa AutomA, es vital centrar al paciente correctamente. Revise nuevamente y verifique que la altura de la mesa esté centrada en relación al paciente. Eleve o baje la mesa según sea necesario antes de tomar las imágenes de reconocimiento. Luego de tomar las imágenes de reconocimiento y de hacer la prescripción, verifique los cálculos mA de la mesa antes de confirmar la exploración. Asegúrese de que los valores mA mínimos y mA máximos estén configurados correctamente. Ver sección sobre AutomA para obtener más detalles.

Aumentar el Pitch

El aumento del pitch disminuirá la cantidad de radiación necesaria para cubrir la región indicada, generalmente sin comprometer la calidad diagnóstica de la exploración. Aumentar el pitch de 1,0 a 1,375:1 disminuye la dosis en un factor de aproximadamente 27%.

Uso de filtros SFOV pequeños

El SFOV más pequeño debe usarse cada vez que sea posible, según el examen y el tamaño del paciente. Ajustar el filtro de pajarita SFOV con el tamaño del paciente garantizará que la dosis vaya donde se la necesita, y será filtrada donde no sea necesaria.

El SFOV pequeño y para la cabeza es compatible con un DFOV de hasta 25 cm de diámetro.

El SFOV mediano y el grande son compatibles con un DFOV de hasta 50 cm de diámetro.

Para la Optima CT540 Series:

El SFOV pediátrico para la cabeza está limitado a 24 kW. Esto limita el máximo mA posible de 200 a 120 kVp.

Σ

Micucci
Healthcare Argentina S.A.

Handwritten signature and stamp: **ROSA DO CARPALO**, **SECRETARIA DE PRODUCCION**, **COMISION NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD**, **COMISION NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD ARGENTINA S.A.**

El **cabezal pediátrico SFOV** es compatible con DFOV de hasta 25 cm de diámetro y utiliza un proceso IBO para corregir los efectos de endurecimiento del haz. El cabezal pediátrico es un campo de visualización especialmente útil para bebés de 18 meses o menores.


Protocolos pediátricos

El área de Protocolo pediátrico se diseñó para ayudar a facilitar la selección del protocolo para pacientes pediátricos mediante la asignación de áreas de protocolo en función de la edad para Head (Cabeza), Orbit (Órbita) y Miscellaneous (Regiones anatómicas varias) y un sistema codificado por colores para Neck (Cuello), Upper Extremity (Extremidades superiores), Chest (Tórax), Abdomen, Spine (Columna) y Pelvis. Se recomienda enfáticamente ubicar y seleccionar los protocolos pediátricos del selector pediátrico en función de la edad, la altura y el peso.

Al ingresar el peso del paciente pediátrico en la pantalla Nuevo paciente, el sistema automáticamente seleccionará el área de código de color apropiada para la región anatómica seleccionada.

Luego de ingresar la información del paciente, haga clic en el botón <Pediatric (Pediátrico)> para visualizar el área de selección anatómica. Las áreas anatómicas figuran como texto.

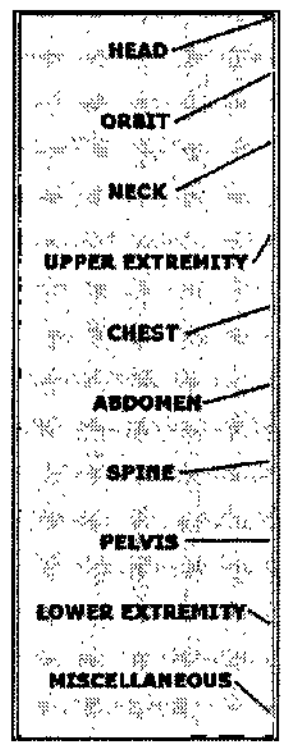Figura 4-3 Selector pediátrico



Codificación por colores para la selección de Protocolo infantil

Basado en el Sistema pediátrico de Broselow-Luten, el sistema de Codificación por colores para niños se desarrolló para ayudar al usuario a seleccionar el protocolo de CT correcto en función de la altura y del peso. El sistema divide los protocolos en nueve zonas de colores en base a la altura y al peso, y aumenta progresivamente la técnica de

E

Maria Micucci
Gerada
GE-Healthcare Argentina S.A.

MARCELO BAROFALO
CO-DIRECTOR TECNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



14028

exploración a medida que el paciente aumenta de tamaño. Este arreglo de los protocolos ayudará al usuario a reducir las variaciones en la selección del protocolo pediátrico. Si no dispone del peso del paciente, también puede utilizar la Cinta de Broselow-Luten para obtener el peso en función de la longitud.

Una vez que se ha seleccionado la región anatómica, aparecen las barras con los colores del arco iris (Figura 4-5) que contienen las selecciones en base al peso de los Códigos por colores para niños. Seleccione la categoría de color en función del tamaño de su paciente, o verifique que se haya seleccionado el color correcto si se ingresó un peso.

Los protocolos en el código por colores seleccionado luego se visualizan como corresponde. Si no existe ningún protocolo de peso específico asociado con el área anatómica seleccionada, aparece la pantalla Protocol Category (Categoría del protocolo) (Figura 4-5). El selector de peso/color predefinido mostrará el peso introducido en la pantalla de información del paciente, o la última selección de peso/color (si no se introdujo información del paciente).

NOTA: Si introduce un peso del paciente en la pantalla de información del paciente y selecciona un selector de color/peso que no es consistente con la información introducida, aparece un mensaje de error (Figura 4-4). Debe reconocer que ha elegido un protocolo que NO coincide con el tamaño del paciente.

En los selectores de la barra de peso/color figuran los rangos de cada zona de peso y longitud, con el nombre del color seleccionado y el número de zona de peso/color, como se indica en el código de color Tabla 4-3

NOTA: Los protocolos ajustados al peso se aplican obligatoriamente a todas las áreas anatómicas excepto la cabeza, la órbita y miscelánea. Los protocolos para las categorías de cabeza y órbita normalmente se definen en función de la edad del paciente y no del peso o la estatura del mismo.

Tabla de códigos de color

Tabla 4-3 Tabla de códigos de color

Número de la zona	Color de la zona	Peso de la zona (kg.)	Peso de zona (lb.)	Longitud de la zona (cm)
1	Rosado	6 - 7,5	13,2 - 16,5	59,5 - 66,5
2	Rojo	7,5 - 9,5	16,5 - 20,9	66,5 - 74
3	Morado	9,5 - 11,5	20,9 - 25,4	74 - 84,5
4	Amarillo	11,5 - 14,5	25,4 - 32,0	84,5 - 97,5
5	Blanco	14,5 - 18,5	32,0 - 40,8	97,5 - 110
6	Azul	18,5 - 22,5	40,8 - 49,6	110 - 122
7	Naranja	22,5 - 31,5	49,6 - 69,5	122 - 137
8	Verde	31,5 - 40,5	69,5 - 89,3	137 - 150
9	Black (Negro)	40,5 - 55	89,3 - 121,3	...

Maria Micucci
Gerente
GE-Healthcare Argentina S.A.

INFORMACION GENERAL
CÓDIGO DE COLOR
GERENTE GENERAL ARGENTINA S.A.

Comprobación de la dosis

La finalidad de la función de comprobación de la dosis es notificar y avisar al personal que prepara y configura los parámetros de exploración antes de iniciarla, normalmente técnicos radiólogos, si el índice de dosis estimado sobrepasa el valor límite definido y configurado por el personal que lo utiliza, el departamento o la institución. La función de comprobación de la dosis está diseñada para cumplir la norma NEMA XR-25.

La comprobación de la dosis está diseñada para ofrecer a los usuarios más información sobre el índice de dosis asociado a la exploración que prescriben, y ofrece una "Notificación" al confirmar la exploración o guardar el protocolo si dicho índice de dosis es superior al establecido por la institución para ese protocolo. Esta notificación debe estar configurada en un nivel considerado superior al de la dosis "rutinaria" o "normalmente prevista", pero no tan alto que pueda suponer un riesgo significativo

para el paciente. De hecho, en función del tamaño de paciente o los requisitos de imagen, podría ser adecuado realizar la exploración con un valor superior al de notificación para lograr el objetivo diagnóstico del examen.

Los valores de notificación no son necesariamente los mismos que los "Valores de referencia diagnóstica" (por sus siglas en inglés DRL), pero pueden consultarse como guía orientativa para determinar el valor de notificación apropiado para su centro y sus pacientes. Puesto que en las exploraciones rutinarias se utiliza una serie de técnicas distintas, en función del tamaño del paciente y los requisitos de imagen, otra consideración a tomar en cuenta para configurar el nivel de notificación será la frecuencia con que su centro desee visualizarla. GE recomienda establecer valores de notificación apropiados para exploraciones pediátricas.

La función de comprobación de la dosis también ofrece una "Alerta" al confirmar la exploración cuando la dosis sobrepase un valor determinado por la institución, por encima del cual el valor del índice de dosis acumulada supere significativamente el establecido por el centro para el examen, sea potencialmente excesivo y por lo tanto exija consideración adicional antes de continuar. GE ha predefinido el valor de alerta del sistema en (AV)1000 mGy CTDIvol, conforme a la carta del 8 de noviembre de 2010 de la Administración de Drogas y Alimentos (por sus siglas en inglés "FDA") estadounidense a MITA.

La comprobación de la dosis debe incorporarse a los procesos de control de calidad del departamento para asegurarse de que los protocolos de exploración se definen en base al principio ALARA ("tan bajo como sea razonablemente posible") en cuanto a dosis y los protocolos de examen se adaptan a la constitución física del paciente. Esta función permite el control y seguimiento de los valores de alerta y las notificaciones, así como ver los protocolos en el sistema con los valores de notificación asociados definidos para los mismos.

La comprobación de la dosis permite:

- Comprobar mediante un valor de notificación si la dosis estimada para la exploración sobrepasa el valor habitual en su centro.
- Comprobar mediante un valor de alerta en qué punto el usuario necesita autorización específica para continuar la exploración con la dosis estimada actual sin cambiar los parámetros de exploración.
- Definir los valores de alerta para adultos y niños con el umbral de edad correspondiente.



14028

- Registro y revisión de auditoría
- Control de cambios de protocolos

Consideraciones sobre protocolos

Antes de utilizar la función de Comprobación de la dosis, el físico del centro y/o el responsable de seguridad de radiación, en colaboración con el radiólogo, debe estar familiarizado con los niveles de dosis actuales de los protocolos de exploración del centro y la dosis máxima que no debe sobrepasarse en los procedimientos médicos del mismo. En base a esta información debe establecerse un punto inicial apropiado para el valor de notificación de cada protocolo y valor de alerta del sistema.

Las directrices de organismos tales como el Colegio Estadounidense de Radiología (American College of Radiology, ACR), Food and Drug Administration (FDA) estadounidense, la Unión Europea (UE), la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) y la Asociación Estadounidense de Físicos en (American Association of Physicists in Medicine, AAPM) pueden resultar útiles para definir los valores de notificación y alerta. El grupo de trabajo AAPM para la normalización de la nomenclatura y los protocolos de CT ha acordado trabajar con la Administración de Drogas y Alimentos (por sus siglas en inglés "FDA") de EE.UU. y la industria en una serie inicial de valores de notificación basados en la ubicación anatómica.

Terminología relativa a la comprobación de la dosis

Valor de notificación (VN)

El VN es el valor de dosis habitual en el centro para cada grupo de exploración. El VN puede comprobarse mediante CTDIvol, DLP o ambos. Este valor debe definirse como el promedio de todos los tamaños de pacientes que se someterán a exploración con ese protocolo. Para determinar el valor de notificación debe considerarse un límite máximo adecuado con respecto al porcentaje de exámenes en el que se prevé normalmente el uso de un valor superior. Las exploraciones en las que se sobrepasen los valores de notificación (VN) quedarán registradas.

Valor de alerta (VA)

El VA es el valor de la dosis en el que se necesita autorización específica para continuar una exploración con un valor superior. El VA puede comprobarse mediante CTDIvol, DLP o ambos.

Administrador de la comprobación de la dosis

El encargado de revisar la dosis es una persona con la función de otorga autorización para activar la comprobación de la notificación y el nivel de alerta.

Usuario que sobrepasa el VA de comprobación de la dosis

El Usuario que sobrepasa el VA de comprobación de la dosis tiene autorización para exceder los valores VA durante la exploración.

Control de cambios de protocolos

Requiere una autorización del usuario para aceptar los parámetros de los protocolos.

Función de administrador de la dosis

[Handwritten mark]
M. Micucci
Parada
GE-Healthcare Argentina S.A.

[Handwritten signature]
MARTÍN GAROFANO
COPISTA TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



En el capítulo Preliminares del Manual de referencia de aprendizaje se ofrecen instrucciones sobre la determinación de usuarios locales, la configuración de un servidor de Enterprise y la definición de grupos locales o de empresa.

La función de administración de la comprobación de la dosis se asigna a nivel de grupo. Los usuarios asignados a un grupo con la función de administración de comprobación de la dosis podrán activar la comprobación de la dosis, definir los valores de alerta (VA) y configurar el umbral de edad del valor de alerta. Se recomienda asignar al grupo de administración de comprobación de la dosis un solo usuario al que se haya otorgado autorización tras acordarlo con el radiólogo, el físico y los responsables del departamento.

1. Haga clic en **Dose Check Management** (Gestión de la comprobación de la dosis) en Protocol Management (Gestión de protocolos).

2. Haga clic en **User Admin Tool** (Administración de usuarios).

3. En la pantalla de administración EA3, escriba su nombre de usuario y contraseña. Pida a su técnico de mantenimiento que le proporcione el nombre de usuario y la contraseña.

4. En la pestaña Local Users (Usuarios locales), haga clic en **Add Local User** (Añadir usuario local).

5. En el panel emergente, rellene estos datos:

- User ID (ID de usuario)
- Full Name (Nombre completo)
- Contraseña
- Confirm Password (Confirmar contraseña)

6. Haga clic en **Add User (Agregar usuario)**.

7. En la pestaña Groups (Grupos), haga clic en **Add Local Group** (Añadir grupo local).

NOTA: Como alternativa, es posible configurar el sistema para grupos de empresa si se ha activado la autenticación de empresa. En el capítulo sobre Privacidad de los datos se ofrece información sobre la configuración de la autenticación de Enterprise.

8. En la ventana Add Local Group, escriba un nombre de grupo único

9. Haga clic en **Add Group (Agregar grupo)**.

- El grupo aparece resaltado en el recuadro de la lista de Local Groups (Grupos locales).

Toda la información y los botones del panel central se refieren al grupo resaltado.

10. Para cambiar las funciones de un grupo, seleccione el recuadro de la opción Dose Admin Role (Función de administración de dosis) y haga clic en **Apply Roles (Aplicar funciones)**.

- Una etiqueta verde confirma las funciones aplicadas.
- Si la operación no se ha realizado correctamente, aparece un mensaje de error.

Advertencias y precauciones

Consulte el capítulo Seguridad para ver información importante de seguridad en relación al uso del equipo y del software de este sistema

Maria...
Micucci
Gerada
Argentina S.A.
GE Healthcare

MARCELO GARCIA
COORDINADOR TECNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Los siguientes avisos de seguridad se emplean para subrayar la importancia de determinadas instrucciones de seguridad. Esta guía utiliza el símbolo internacional junto con el mensaje de peligro, aviso o precaución. En esta sección se describe además el significado de una nota.



PELIGRO: Se usa la palabra "peligro" para identificar condiciones o acciones respecto de las cuales se conoce un riesgo específico que causa lesiones personales graves, la muerte o un daño material importante si no se atienden las instrucciones.



ADVERTENCIA: Se usa la palabra "advertencia" para identificar condiciones o acciones respecto de las cuales se conoce un riesgo específico que puede causar lesiones personales graves, la muerte o un daño material importante si no se atienden las instrucciones.



CUIDADO: Esta etiqueta corresponde a estados o acciones que suponen un riesgo potencial. Ignorar estas instrucciones puede provocar lesiones o daños materiales leves.

NOTA: Una nota proporciona información adicional útil. Puede recalcar información determinada referente a herramientas o técnicas especiales, artículos que deba comprobar antes de continuar o factores que deba tener en consideración sobre un concepto o una tarea.

Advertencias

Este sistema fue diseñado para ser utilizado por operadores entrenados en la utilización de sistemas de CT. Lea con atención el capítulo de seguridad de este manual antes de explorar al primer paciente. Utilice el índice para encontrar la sección y el número de página de una sección que le interese, Revise regularmente la Guía de aprendizaje y referencia, los consejos y soluciones para aplicaciones y el Manual de referencia técnica.

Antes del encendido del sistema, deberán mantenerse durante al menos 24 horas las condiciones operativas del ambiente de la sala que se encuentran en el capítulo de Especificaciones del sistema. Estas condiciones deberán ser mantenidas constantemente cuando el sistema esté alimentado y/o en uso.

No cargue ningún software que no esté aprobado por GE en la computadora.

Asegúrese de que todas las cubiertas están colocadas en su lugar antes de utilizar el equipo. Las cubiertas lo protegen a usted y su paciente de partes móviles y de descargas eléctricas. Las cubiertas también protegen al equipo en sí.

NOTA: Solamente el personal de mantenimiento cualificado puede realizar tareas de mantenimiento en el sistema cuando las cubiertas están quitadas.

Este sistema está diseñado únicamente para ser utilizado por profesionales de la salud. Este sistema puede causar interferencia radial o puede perjudicar la operación del

14028



equipo cercano. Puede ser necesario tomar medidas de atenuación, como reorientar o recolocar el sistema o proteger la ubicación.

El sistema debe ser instalado por las personas cualificadas designadas por el fabricante. Para asegurar una instalación correcta del equipo, póngase en contacto con su representante técnico local de GE Healthcare.

NOTA: Encontrará las instrucciones de instalación en el Manual de preinstalación e instalación incluido con el equipo.

No se permiten modificaciones de este equipo sin la autorización del fabricante.

El uso incorrecto de los equipos de rayos X puede causar lesiones. Lea con atención las instrucciones de este manual antes de utilizar el equipo.

Si no toma las precauciones necesarias con respecto a los rayos X o ignora las recomendaciones del manual, usted y sus pacientes se arriesgan a recibir radiaciones peligrosas.

Toda persona en contacto con equipos de rayos X debe adoptar las medidas adecuadas para protegerse contra posibles lesiones.

Todas las personas autorizadas a utilizar el equipo deben conocer y comprender los riesgos que se corren ante la exposición a rayos X con el fin de que eviten cualquier daño o lesión derivados de la exposición. GE recomienda firmemente el uso de materiales y dispositivos de protección contra los daños y lesiones que puede provocar la exposición a rayos X.

No realice nunca exploraciones a pacientes con personal no autorizado dentro de la sala de exploración. Advierta a los visitantes y pacientes sobre las consecuencias dañinas que pueden derivarse del incumplimiento de las instrucciones.

Nunca calibre, pruebe el explorador ni caliente el tubo si hay pacientes o personal en la sala de examen sin que se utilicen las precauciones adecuadas contra la radiación.

– Permanezca detrás de una mampara de plomo o de vidrio durante la emisión de rayos X.

– Use los factores de técnica prescritos por el radiólogo o el médico y una dosis que produzca los mejores resultados con la menor exposición posible a los rayos X.

– Los pilotos ámbar del panel de visualización del estativo y la parte trasera del mismo se iluminan durante la emisión de rayos X.

El uso de controles o ajustes, o la realización de procedimientos distintos a los especificados puede provocar una exposición a la radiación peligrosa.

No conecte accesorios que no están aprobados como parte del sistema.

No utilice accesorios de otras modalidades.

Ninguno de los accesorios soporta el peso completo de un paciente. Si se sienta, se para encima o aplica presión excesiva sobre estos dispositivos, éstos pueden romperse o soltarse de la parte superior de la mesa y, pueden provocar lesiones. Observe que si un accesorio se rompe, debe tener cuidado al recogerlo y no debe continuar usándolo.

Peligros

La información sobre los componentes internos del estativo se ofrece para mayor ilustración de los usuarios. El estativo tiene voltajes peligrosos y piezas móviles. PARA

Maria Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.

Dr. [Signature]
COORDINADOR GENERAL
COMITÉ TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



14028

EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PROVOCADAS POR APLASTAMIENTO, NO RETIRE LAS CUBIERTAS NI SE INTRODUZCA EN EL ESTATIVO. SÓLO EL PERSONAL CALIFICADO PUEDE RETIRAR LAS CUBIERTAS DEL ESTATIVO O LAS DE OTRAS PARTES DEL EQUIPO.

Las exploraciones de CT pueden producir interferencias con dispositivos médicos implantados o utilizados en forma externa como marcapasos, desfibriladores, neuroestimuladores y bombas de infusión de fármacos.

La interferencia podría causar cambios operativos o funcionamiento deficiente del dispositivo médico electrónico.

Cuando esté utilizando accesorios de colocación del paciente que no sean opciones de GE, asegúrese que no haya áreas que puedan causar un punto de compresión o interferencias con el IV o tubo del paciente.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Evite todo contacto con conductores eléctricos. No quite ni abra cubiertas ni enchufes del sistema. Los circuitos internos utilizan alto voltaje y pueden ocasionar lesiones graves.

Para garantizar un rendimiento seguro y fiable del equipo, prepare el sitio según los requisitos establecidos por GE Medical Systems. Esto incluye asegurarse de que el equipo está conectado a un suministro eléctrico con toma de tierra protectora. Si tiene dudas acerca de estos requisitos, póngase en contacto con GE Medical Systems.

Si alguna luz, monitor o indicador interno permanece encendido una vez apagado el sistema, puede producirse una descarga eléctrica. Para impedir que se produzcan lesiones, gire y apague el interruptor del suministro de alimentación principal y póngase en contacto con el departamento de mantenimiento inmediatamente.

LOS COMPONENTES NO PUEDEN SER MANIPULADOS POR EL USUARIO. Envíe para el servicio al personal de servicio calificado. Sólo las personas que conozcan los procedimientos adecuados y el uso de las herramientas apropiadas deben instalar, ajustar, reparar o modificar el equipo.

Para garantizar un rendimiento seguro y fiable del equipo, prepare el lugar de trabajo según los requisitos establecidos por GE. Si tiene dudas póngase en contacto con GE.

Si el fusible se funde 36 horas después de haberlo reemplazado, ello puede significar que los circuitos eléctricos del sistema no funcionan correctamente. Solicite que el personal de mantenimiento cualificado revise el sistema y no intente reemplazar ningún fusible.

INCENDIO ELÉCTRICO. Los fluidos conductivos que se filtran por los componentes del circuito activo del sistema pueden ocasionar cortacircuitos que pueden provocar incendios. Por tanto, no coloque ningún líquido o comida en ninguna pieza del sistema.

Para evitar descargas eléctricas o quemaduras por el uso de un tipo de extintor de incendios incorrecto, asegúrese de usar sólo extintores de incendios aprobados para su uso en incendios ubicados en el sistema eléctrico

Director Técnico: Ing. Eduardo Domingo Fernández – MN 5363 COPITEC

Autorizado por la ANMAT PM 1407-210

Limpieza y Mantenimiento del Sistema

5

Maria Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
DE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



14028

- ♦ Para garantizar un funcionamiento seguro y confiable del equipo, el lugar en donde se vaya a instalar el equipo debe prepararse para que cumpla los requisitos de GE Medical Systems, tal y como se especifica en el manual de pasos previos a la instalación.
- ♦ Este sistema no contiene piezas que necesiten ningún tipo de mantenimiento. Sólo el personal de mantenimiento cualificado debe instalar, mantener y reparar el equipo siguiendo siempre los procedimientos descritos en los manuales de mantenimiento del equipo.
- ♦ No debe modificarse el equipo en conjunto ni ninguna pieza de éste sin antes obtener de GE Medical Systems la aprobación por escrito para realizar esto.
- ♦ Mantenga limpio el equipo. Elimine los fluidos corporales o los derrames intravenosos para evitar contagios y daños de las piezas internas. Limpie el equipo con cualquiera de los siguientes agentes de limpieza aprobados.
 - Agua tibia y jabón o un antiséptico suave
 - Blanqueador casero común - diluido 10:1
 - Toallas Sani-cloth HB
 - Perasafe
 - Incidin Plus
 - TriGene
- ♦ Además, limpie en seco los componentes eléctricos.
- ♦ No limpie los conectores en los cables del equipo para ECG, respiratorio, etc. Si es necesario limpiarlos, comuníquese con GE Service.
- ♦ El mantenimiento programado debe realizarse de manera periódica para asegurar el buen funcionamiento del equipo.
- ♦ Para obtener más información sobre cómo el usuario debe llevar a cabo el mantenimiento del sistema y las pruebas de rendimiento del mismo, consulte las secciones de mantenimiento y calibración del Manual de referencia técnica.

Mantenimiento diario

Este capítulo describe cómo preparar el sistema para su uso diario y cómo realizar calibraciones. Incluye instrucciones que lo guiarán paso a paso para llevar a cabo los siguientes procedimientos:

- Realizar el calentamiento del tubo
- Realice calibraciones de aire (FastCals) para la Optima CT540 Series

NOTA: Cuando efectúe calibraciones o caliente el tubo, es esencial que la zona del estativo esté libre de objetos. Toda obstrucción dentro del estativo puede ocasionar la aparición de artefactos en las imágenes exploradas.

Realizar calibraciones diarias

El sistema requiere que todas las configuraciones de kV y mA estén dentro de determinados rangos. Dichos rangos se establecen y mantienen mediante calibraciones de aire. Existen dos tipos de calibraciones en el sistema: las calibraciones de aire y las

M. de M. Micucal
Gerada
GE Healthcare Argentina S

MARCELO CARLOS
CORREA
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



-14028

de generador. Las calibraciones de aire y de generador las realiza el usuario como parte de la rutina de preparación diaria, para luego continuar con el procedimiento de calentamiento del tubo.

NOTA: Si los detectores no tienen la temperatura de funcionamiento, aparecerá un mensaje indicando el momento en el que los detectores alcanzarán esta temperatura.

NOTA: Si experimenta un cambio brusco en la temperatura ambiente (+/-10 grados), se recomienda que lleve a cabo una calibración rápida para mantener una calidad de la imagen óptima y, una vez que la temperatura se haya estabilizado, deberá realizar otra calibración rápida.

Realizar el calentamiento del tubo

El sistema funciona con más eficacia al usar ciertos parámetros. Estos parámetros se establecen calentando el tubo con la ayuda de un grupo de exposiciones predefinido.

Cuando realiza el calentamiento del tubo porque lo pide el sistema, se reduce el riesgo de artefactos y puede ayudar a prolongar la vida útil del tubo.

NOTA: Cada 7 días se realizará una revisión de calidad del haz para verificar la integridad del haz de rayos x. El sistema le pedirá que se asegure de que el haz no tenga ningún obstáculo. Esto incrementará un poco el tiempo de calentamiento del tubo.

NOTA: GE recomienda calentar el tubo siempre que haya estado dos horas fuera de uso para los sistemas de la Optima CT540. Sólo son necesarias las exploraciones de calentamiento en este punto.

NOTA: Si los detectores se han enfriado debido al corte de suministro del A1 (Interruptor), encienda el sistema y espere dos horas antes de realizar el calentamiento del tubo.

Esto permite que los detectores recuperen su temperatura normal de funcionamiento.

NOTA: Si el calentamiento del tubo no se lleva a cabo cuando lo solicita el sistema, el tubo y el sistema pueden resultar gravemente dañados.

NOTA: Si no se realiza el calentamiento del tubo, se reducirá el valor de mA máximo posible para el examen después de que se cancele u omite el calentamiento del tubo.

El valor de mAs deseado puede lograrse cambiando el tiempo de giro ($mAs = mA \times \text{tiempo de giro}$).

Calibraciones de todo el sistema

Las calibraciones de todo el sistema las realiza normalmente un técnico cualificado, después de cambiar un tubo o como parte de un mantenimiento preventivo. Las calibraciones del generador son herramientas exhaustivas y de gran precisión, que emplean maniqués, detectores y factores de exposición que afectan a la calidad de imagen y a la dosis de radiación.

Realizar el calentamiento del tubo

Para garantizar un rendimiento óptimo y una calidad de imagen constante, realice un calentamiento del tubo si el sistema ha permanecido inactivo durante dos o más horas. El sistema notifica cuándo se alcanzan estas dos horas mediante un mensaje.

Maria Micucci
Gerada
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

1. En el monitor de exploración, seleccione **[Daily Prep]** (Preparación diaria).



- La pantalla cambia y el sistema muestra botones de función azules para el calentamiento del tubo y las calibraciones rápidas (calibraciones de aire) en la esquina superior izquierda de la pantalla.

La casilla de mensajes indica el orden correcto de operación para FastCal y Calentamiento del tubo después de iniciado el sistema. Si se debe ejecutar el FastCal diario, no realice el procedimiento de Calentamiento del tubo antes de seleccionar FastCal.

- Aparece un área de mensajes en la esquina superior derecha.

2. Seleccione **[Tube Warm-Up]** (Calentamiento del tubo).

- El sistema muestra un mensaje de advertencia en un cuadro de diálogo. Esto se debe a que los algoritmos de enfriamiento del tubo están establecidos para tubos específicos de GE. Si se ha instalado cualquier otro tubo, usted se responsabiliza.

NOTA: Consulte el apartado del capítulo Seguridad que se ocupa de la utilización de tubos que no son de GE.

Figura 6-2 Mensaje de atención de Calentamiento de tubo que no es de GE.



3. Seleccione **[Accept & Run Tube Warm-up]** (Acepta y ejecuta el calentamiento del tubo) para continuar.

- El sistema muestra ahora un área de mensajes con detalles de cada uno de los cortes en relación con los kV, los mA, el espesor del corte y la duración de la exposición.

NOTA: Asegúrese de que no hay objetos ni personal en la zona del estativo.

4. Presione **Start Scan** (Iniciar exploración) en la parte superior del teclado.

El sistema realiza automáticamente todas las exploraciones para el calentamiento del tubo.

– Para los sistemas Optima CT540, este procedimiento lleva entre 53 y 60 segundos.

El sistema vuelve al menú Daily Prep una vez finalizadas las exploraciones.

5. Seleccione **[Quit]** (Salir) o pase a Fast Calibrations (Calibraciones rápidas).

Si elige salir se cierra la ventana Daily Prep

Realice calibraciones de aire (FastCals) para la Optima CT540 Series

Las calibraciones de aire, también denominadas Fast Cals (Calibraciones rápidas), deben realizarse diariamente. Si el sistema ha estado inactivo durante más de dos horas

14028



antes de realizar la calibración rápida no necesita calentar el tubo previamente, el calentamiento del tubo forma parte del proceso de calibración rápida. Estas calibraciones garantizan una calidad de imagen y una exposición a la radiación constantes.

1. Haga clic en **[Fast Calibration]** (Calibración rápida).

- ♦ Al seleccionar esta función, el sistema comprueba la tarjeta del convertidor DAS y la calibración del colimador. Esto garantiza que se ha instalado la tarjeta del convertidor DAS correcta.
- ♦ La revisión de equilibrio del estativo se realiza automáticamente al seleccionar la calibración rápida. La revisión de equilibrio tarda aproximadamente 2 minutos.

Aparece una ventana emergente rosa que indica que la verificación está en curso.

- ♦ Durante la calibración rápida, el sistema comprueba la tarjeta del convertidor DAS y la calibración del colimador. Esto garantiza que se ha instalado la tarjeta del convertidor DAS correcta.

NOTA: No introduzca ningún objeto en el estativo durante las calibraciones rápidas. Éstas se realizan sin la ayuda de maniqués.

2. Presione **Start Scan** (Iniciar la exploración).

- ♦ Este proceso puede durar hasta 30 minutos en completarse.
- ♦ Esta función ejecuta el calentamiento si la temperatura del tubo es inferior a 200 grados centígrados antes de efectuar la calibración del generador.

3. A continuación se efectúa la verificación de la limpieza de la ventana Mylar.

- ♦ La ventana Mylar debe mantenerse limpia. La suciedad puede dañar los archivos de calibración.
- ♦ Si detecta una ventana sucia, aparecerá un mensaje de advertencia (Figura 6-4) y debe limpiar la ventana y dar clic en **[Clean and Retry]** (Limpiar y reintentar).
- ♦ Seleccione **[Continue]** (Continuar) si las ventanas están limpias y no necesitan de su atención.
- ♦ Cada 6 meses, se realiza una prueba de la pendiente Z automática (Auto Z-Slope) después del Calentamiento II para comprobar el buen estado del detector. Si esta prueba da resultados negativos, un mensaje le aconseja que llame a su técnico de servicios.
- ♦ A continuación, se llevan a cabo las exploraciones Collimator Cal (Calibración del colimador) en varias estaciones. El sistema sólo ejecuta lo anterior si la última Collimator Cal fue realizada hace más de 24 horas.
- ♦ Aparece la pantalla de Calentamiento 2 y el sistema ejecuta otra serie de exploraciones de calentamiento si la temperatura del tubo está entre 590 y 777 grados centígrados.
- ♦ Luego se realiza una exploración que comprueba la posición del punto focal. Esto asegura un funcionamiento apropiado de la función de rastreo de haz del eje Z.
- ♦ El sistema finaliza el procedimiento Fast Cal (Cal. rápida) realizando las exploraciones de calibración rápida desde la pantalla de la lista de exploraciones del mapa de interconectividad. Esto comprende las exploraciones Clever Gains (Ganancias inteligentes), las cuales calibran la ganancia de las configuraciones de cada uno de los detectores. Por defecto, se realizan exploraciones de calibración rápida para 120 y 140

Mitucci
Gerente General
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO MITUCCI
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



14028

kVp. Si tiene intención de utilizar 80 o 100KVP para cualquier examen, comuníquese al técnico de servicio para que se calibre apropiadamente el sistema.

Limpieza

El sistema no es hermético al agua. No está diseñado para proteger los componentes internos contra la entrada de líquidos. Limpie las superficies externas del sistema (estativo, mesa, consola, accesorios) con un paño suave mojado en agua caliente y exprimido hasta que quede húmedo, casi seco. De ser necesario, utilice sólo jabón suave para eliminar la suciedad.

Evite causar daño al equipo. Algunos limpiadores "rociar y limpiar" raspan y opacan permanentemente las superficies de plástico. Utilice sólo agua tibia y jabón suave para limpiar las superficies.

Alfombrado

- Instale alfombras antiestáticas o trate las alfombras existentes con una solución antiestática.
- Las descargas estáticas afectan la operación y pueden causar fallas del sistema.

NO use lana de acero para limpiar los pisos de baldosas en las salas de exploración. Las fibras finas de metal pueden entrar al sistema y causar cortocircuitos internos.

Equipo de Limpieza (Bio Hazard)

CUIDADO: Procedimiento de patógenos de flujo de sangre: Antes de que cualquier equipo sea reparado o regresado a GEMS, deben cumplirse los siguientes criterios:

- ♦ El equipo usado en la clínica o ambiente de laboratorio, debe estar limpio y libre de sangre y otras sustancias infecciosas.
- ♦ Los clientes son responsables por la condición sanitaria del equipo. El procedimiento recomendado de limpieza del equipo, para limpiar cualquier líquido o materia descubiertos en áreas accesibles o dentro del equipo bajo la supervisión de servicio, es el siguiente:
 - Usar equipo de protección personal.
 - Use guantes apropiados de Nitrilo.
 - Antes de la limpieza preste atención a bordes afilados u objetos que pueden cortar los guantes. Si los guantes se rasgan, retírelos, lávese las manos cuidadosamente y póngase los guantes otra vez.
 - Use un paño o toallas de papel, además de un limpiador, cuidando de no salpicar el material.
 - Desinfecte el área utilizando blanqueador común diluido 10:1 o un agente de limpieza aprobado incluido en la sección mantenimiento y limpieza. Limpie todos los instrumentos que estén en contacto con líquido corporal.
 - Dado que los virus requieren humedad para permanecer activos, seque toda el área.
 - Cuando tenga la seguridad de que el área está limpia y seca, coloque los materiales usados de limpieza en un bolso rojo de biopeligro.

Maria J. Micucci
Jurada
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



14028

– Retire los guantes, retirándolos de dentro y colóquelos en el bolso rojo de biopeligro. Cierre y entregue el bolso al personal adecuado para su correcta eliminación.

Asuntos ambientales

Este símbolo indica que el equipo eléctrico y electrónico no debe tirarse con los desechos domésticos y debe tratarse por separado. Comuníquese con un representante autorizado del fabricante para obtener más información sobre la forma de desechar el equipo.

Seguridad

Este capítulo informa de las precauciones y medidas de seguridad que deben adoptarse.

Lea detenidamente el contenido de este capítulo para seguir los procedimientos y precauciones de seguridad correctamente.

Conviene guardar este manual cerca de la consola para tenerlo siempre a mano.

Este sistema fue diseñado para ser utilizado por operadores entrenados en la utilización de sistemas de CT. Lea con atención el capítulo de seguridad de este manual antes de explorar al primer paciente. Utilice el índice para encontrar la sección y el número de página de una sección que le interese, Revise regularmente la Guía de aprendizaje y referencia, los consejos y soluciones para aplicaciones y el Manual de referencia técnica.

Si es necesario, puede recibir entrenamiento adicional por parte de un especialista en aplicaciones de GE. Póngase en contacto con el representante de ventas de GE de su institución para obtener más información acerca de otros cursos de entrenamiento sobre la seguridad y el funcionamiento.

Instrucciones de seguridad específicas

- Este producto ha sido diseñado y fabricado para garantizar el máximo nivel de seguridad en su funcionamiento. Debe manejarse y mantenerse siguiendo estrictamente las precauciones y las advertencias de seguridad así como las instrucciones de funcionamiento incluidas en este documento y en otros documentos específicos del producto.
- El sistema ha sido diseñado para cumplir con todos los requisitos de seguridad que se aplican a los equipos médicos. Sin embargo, cualquier persona que maneje el sistema debe ser totalmente consciente de los posibles peligros que afectan a la seguridad.
- Sin embargo, ni el fabricante ni el distribuidor del equipo garantizan que el hecho de leer este manual capacitan al lector para manejar, probar o calibrar el sistema.
- El propietario debe asegurarse de que sólo el personal debidamente entrenado y completamente cualificado esté autorizado para manejar el equipo. Debe crearse una lista de aquellos operadores que están autorizados a manejar el equipo.
- El personal autorizado debe mantener ese manual a mano, leerlo con detenimiento y revisarlo periódicamente.
- No debe permitirse obtener acceso al sistema al personal no autorizado.
- No deje al paciente desatendido en ningún momento.

Maria Micucci
Gerada
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
CO-DIRECCION TECNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



- Familiarícese con el hardware, de modo que pueda identificar problemas graves. No utilice el sistema si aparenta estar dañado o no funciona correctamente. Espere hasta que el personal cualificado solucione el problema.
- Las abreviaturas que se utilizan en los manuales del operador se pueden encontrar en la guía de aprendizaje y referencia.
- Si el equipo no funciona correctamente, o si no responde a los controles tal y como se describe en este manual, el operador debe:
 - Primero garantice la seguridad del paciente.
 - Luego asegure la protección del equipo.
 - Evacuar el área lo más rápidamente posible en el caso de que se produzca una situación que pueda ser potencialmente insegura.
 - Seguir las precauciones y los procedimientos de seguridad tal y como se especifica en este manual.
 - Ponerse en contacto inmediatamente con la oficina de mantenimiento local, o informar del incidente y esperar instrucciones.
- Las imágenes y los cálculos proporcionados por este sistema tienen la función de servir como herramientas para los usuarios competentes. No deben considerarse como una sola base incuestionable para el diagnóstico clínico. Nos gustaría animar a los usuarios a que lean los manuales y lleguen a sus propias conclusiones de un modo profesional sobre el uso clínico del sistema.
- Entienda las especificaciones del producto, la precisión del sistema y las limitaciones en cuanto a estabilidad. Considere estas limitaciones antes de tomar una decisión basada en valores cuantitativos. En caso de duda, consulte al representante de ventas.
- No bloquee los puertos de ventilación del equipo electrónico. Siempre mantenga al menos 6 pulgadas (15 cm) de huelgo alrededor de los puertos de ventilación para impedir que se sobrecalienten y resulten dañadas las piezas metálicas del sistema electrónico.
- Compruebe la compatibilidad electromagnética de otros equipos. Para obtener más información, consulte la sección compatibilidad electromagnética en el manual de referencia técnica, bajo lineamientos generales de seguridad.

Seguridad de dispositivos implantables

Las exploraciones de CT pueden producir interferencias con dispositivos médicos implantados o utilizados en forma externa como marcapasos, desfibriladores, neuroestimuladores y bombas de infusión de fármacos.

La interferencia podría causar cambios operativos o funcionamiento deficiente del dispositivo médico electrónico.

Recomendaciones para antes de la exploración:

- ♦ Si es posible, trate de dejar los dispositivos externos fuera del alcance del explorador.
- ♦ Solicite a los pacientes con neuroestimuladores que apaguen el dispositivo en forma temporal mientras se lleva a cabo la exploración.
- ♦ Minimice la exposición de los dispositivos médicos electrónicos a los rayos X.

Maria Micucci
 Gerente
 GE HealthCare Argentina S.A.

MARCELO
 DIRECTOR TÉCNICO
 GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



- ♦ Utilice la menor corriente posible del tubo de rayos X consistente con obtener la calidad de imagen requerida.
- ♦ No explore directamente sobre el dispositivo electrónico durante más de unos cuantos segundos.

NOTA: Para los procedimientos como la obtención de imágenes con perfusión CT o CT intervencionistas que requieren la exploración sobre el dispositivo médico electrónico durante más de unos segundos, debe haber personal de asistencia disponible para tomar medidas de emergencia y tratar las reacciones adversas que pudieran presentarse.

Recomendaciones para después de la exploración:

- ♦ Pida al paciente que vuelva a encender el dispositivo si éste fue apagado antes de la exploración.
- ♦ Pida al paciente que revise si el dispositivo está funcionando correctamente, aun si lo había apagado.
- ♦ Recomiende a los pacientes que se comuniquen con su médico de inmediato si sospechan que el dispositivo no está funcionando adecuadamente después de una exploración CT.

NOTA: Recomendaciones de la Preliminary Public Health Notification de la FDA: Posible falla de dispositivos médicos electrónicos causados por una exploración por tomografía computarizada (CT) de la FDA fecha 14 de julio de 2008.

Seguridad contra la radiación

ADVERTENCIA: El uso incorrecto de los equipos de rayos X puede causar lesiones. Lea con atención las instrucciones de este manual antes de utilizar el equipo.

Si no toma las precauciones necesarias con respecto a los rayos X o ignora las recomendaciones del manual, usted y sus pacientes se arriesgan a recibir radiaciones peligrosas.

Usuarios autorizados

Este equipo incorpora un alto nivel de protección contra los rayos X distintos del haz útil. No obstante, el equipo no exime al usuario de su obligación de adoptar las medidas de precaución adecuadas para evitar su exposición o la de otras personas a la radiación por falta de atención, descuido o ignorancia.

Toda persona en contacto con equipos de rayos X debe recibir una formación adecuada y seguir las recomendaciones del Consejo nacional sobre mediciones y protección de radiaciones (NCRP) y de la Comisión Internacional de Protección de las Radiaciones.

ADVERTENCIA: Toda persona en contacto con equipos de rayos X debe adoptar las medidas adecuadas para protegerse contra posibles lesiones.

Todas las personas autorizadas a utilizar el equipo deben conocer y comprender los riesgos que se corren ante la exposición a rayos X con el fin de que eviten cualquier daño o lesión derivados de la exposición. GE recomienda firmemente el uso de materiales y dispositivos de protección contra los daños y lesiones que puede provocar la exposición a rayos X.

Radiación general y seguridad

Marcos Micucci
Gerente General
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCOS GAROFALO
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Exploraciones adquiridas en el mismo plano tomográfico

La norma de la IEC 60601-2-44 sección 29, párrafo 105 indica que es necesario avisar al usuario cuando se adquieran exploraciones de CT en el mismo plano tomográfico, es decir, en la misma ubicación de exploración. Esta advertencia es necesaria para que los usuarios conozcan la dosis potencial que se puede administrar a los pacientes cuando se adquieran exploraciones en la misma ubicación de mesa.

Cuando adquiera exploraciones de este modo:

- Utilice la información sobre dosis que aparece en la pantalla View Edit (Ver/Editar).


Esta información se trata en la siguiente sección, CTDIvol.

- En la Serie 997 se guarda un informe estructurado (SR) de dosis DICOM.
- Use las técnicas apropiadas para la aplicación utilizada y la región anatómica que está explorando.

Un mensaje de precaución Figura 2-16 aparece cuando **[Confirmar]** se selecciona para los siguientes tipos de exploración:

- SmartStep/SmartView
- Exploraciones de línea base y vigilancia de SmartPrep.
- Exploraciones tipo cine
- Exploraciones axiales con un incremento de mesa (intervalo) cero.

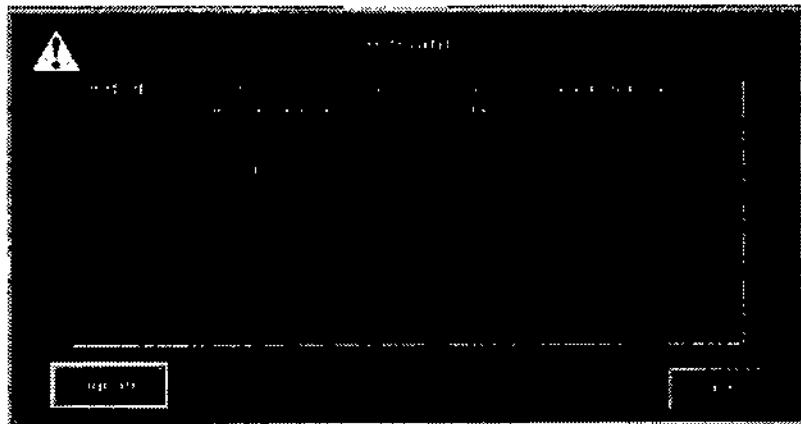Figura 2-16 Mensaje de advertencia cuando se explora en el mismo plano tomográfico: Axial, Cine y Helicoidal.



CTDIvol

Al configurar los parámetros de exploración en la pantalla View/Edit (Ver/editar), la zona de Información de la dosis en el margen superior derecho del monitor de exploración contiene los datos actualizados. Esta información se basa en una medición del CTDI o Índice de dosis de CT, que es el estándar actual de rendimiento y dosimetría de CT. Mediante el uso de una medición denominada CTDIvol, se proporciona un solo valor para calcular la dosis relativa para un examen.

La CTDIvol es una medida media ponderada en un maniquí de referencia. Esta dosis se expresa en miliGrays. Si necesita más información sobre dosis CTDIvol particulares y su cálculo, consulte el manual técnico.



14028

El DLP o Producto de la longitud de la dosis es el resultado del CTDIvol y de la longitud de exploración de un conjunto de exploraciones. Es posible calcular este número para el examen en su totalidad y ofrecer así una estimación de la dosis total. El valor se expresa en centímetros miliGrays.

El DLP de serie proyectada muestra el DLP que se origina al explorar el grupo o los grupos actuales.

El DLP de examen acumulado muestra el DLP del examen total hasta el momento actual. La dosis de reconocimiento no se incluye en los totales del DLP, puesto que no se han definido todavía los estándares para informar sobre la dosis de reconocimiento. La dosis de reconocimiento representa normalmente sólo una pequeña parte del examen.

La información sobre la dosis se actualiza al modificar valores técnicos como los kV, los mA, el tiempo de exploración, el espesor del corte y el campo de visión de la exploración.

La información de la dosis se guarda como captura de imagen en la Serie 999 cuando haya finalizado el examen y la serie 997 contiene el informe estructurado de dosis DICOM.

Imágenes de pacientes pediátricos y pequeños

Las técnicas y los protocolos de adultos no deben utilizarse con pacientes de menos de 2 años de edad. El instituto nacional del cáncer y la sociedad de radiología pediátrica desarrollaron un folleto, <http://www.cancer.gov/cancertopics/causes/radiation-risks-pediatric-CT> y la FDA emitió una notificación de salud pública, <http://www.fda.gov/cdrh/safety/110201-ct.html>, que hablan sobre el valor del CT y la importancia de reducir la dosis de radiación, especialmente en niños. También se puede obtener más información en <http://www.fda.gov/cdrh/ct/>.

Tubos de rayos X

El sistema utiliza algoritmos de enfriamiento y reconstrucción diseñados específicamente para los tubos de rayos X de GE.

Si no utiliza tubos de rayos X de GE se expone a dos riesgos:

- Un tubo que no sea de GE podría provocar falla destructiva de componentes si los plazos de enfriamiento no se ajustan a los requisitos del diseño.
- Las imágenes podrían mostrar un menor rendimiento o artefactos si el tubo de rayos X no cumple las especificaciones de rendimiento del tubo de GE.
- La fuga de radiaciones puede exceder las especificaciones de GE cuando en el sistema se instala un tubo de rayos X que no es GE.

CUIDADO: No podemos garantizar el desempeño o la seguridad si se usa un tubo de rayos X de un fabricante que no sea GE, ya que los algoritmos de enfriamiento y reconstrucción dependen del diseño del tubo. La fuga de radiaciones puede exceder las especificaciones de GE cuando en el sistema se instala un tubo de rayos X que no es GE.

Seguridad contra riesgos eléctricos

M. r. Micucci
Gerada
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Un sistema de CT combinado con accesorios aprobados por GE cumple los requisitos de la norma IEC60601-1 sobre seguridad y rendimiento de sistemas médicos eléctricos. Consulte la norma para más información.

- No conecte al sistema de CT aparatos eléctricos no aprobados por GE. Puede provocar un aumento de escape de corriente eléctrica y existe la posibilidad de descarga eléctrica.
- Los monitores de la consola de GE, el módem, el amplificador de vídeo y la torre de comunicaciones deben alimentarse a través del sistema de CT con los cables incluidos.


No conecte estos aparatos a suministros de alimentación distintos del sistema de CT (tales como tomas murales u otros equipos eléctricos). Puede provocar un aumento de escape de corriente eléctrica y existe la posibilidad de descarga eléctrica.


- Tenga en cuenta que algunos equipos solo pueden conectarse a un equipo de GE mediante un cable de señal (por ejemplo, un concentrador de red). Se necesita un dispositivo separador para aparatos alimentados por una fuente de alimentación distinta.

Seguridad contra riesgos mecánicos

Seguridad mecánica general

- Verifique que no haya obstrucciones alrededor del equipo antes de intentar mover la mesa y el estativo. Al realizar movimientos de la mesa o del estativo, supervise en todo momento los movimientos.
- Preste especial atención cuando incline el estativo o desplace la mesa cuando la extensión de la camilla o el reposacabezas está en su lugar, para evitar que estos accesorios choquen con las cubiertas del estativo.

 El (Cradle Unlatch Indicator; Indicador de desbloqueo de la camilla) se ilumina en verde cuando se desbloquea la camilla. Una camilla sin bloquear podría moverse en forma inesperada.

 El indicador (Interference; Interferencia) se ilumina cuando la camilla alcanza el límite de su recorrido o encuentra obstáculos.

Si la mesa alcanza uno de los límites mientras activamente se está presionando los controles, la luz de límite se apagará al soltar los controles.

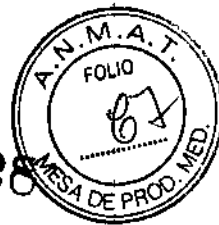
Elimine un obstáculo, cambiando la inclinación del estativo, moviendo la camilla o ajustando la altura de la mesa.

ADVERTENCIA: No utilice la base de la mesa para reposar los pies. Podría quedar atrapado o lesionarse los pies al bajar la altura de la mesa. No coloque las manos entre la base y los paneles laterales de la mesa.

ADVERTENCIA: No ponga las manos dentro de la apertura del estativo al inclinarlo. El estativo podría pellizcar o aplastar sus manos.

ADVERTENCIA: Asegúrese que el estativo no llegará a tocar al paciente durante la operación de inclinación remota. Si el estativo toca al paciente, puede pellizcar o aplastar partes de su cuerpo.

- Evite que el paciente entre en contacto con el estativo durante la inclinación o el movimiento de la camilla (controlada manual o automáticamente).



4028

Modo de huella corta

- Si el sistema está ajustado a modo de huella corta, el rango explorable se limita en consecuencia. Esto lo debe aprobar el cliente durante la preinstalación.
- Solo personal de servicio calificado debe cambiar el ajuste del modo de huella corta.

ADVERTENCIA: La posición de EN-límite de la camilla en modo de huella corta debe establecerse para no pellizcar el pie del paciente entre la orilla de la camilla y la pared del cuarto de exploración.

ADVERTENCIA: Para evitar pellizcar o aplastar al paciente, vigile al paciente y el equipo en todo momento durante el desplazamiento de la mesa. Si se producen movimientos accidentales o no consigue detenerse, presione los botones interruptor de emergencia de la consola o del estativo.

Colocación del paciente

CUIDADO: Nunca pierda de vista al paciente.

– Nunca deje al paciente sin atención.

CUIDADO: Si la cabeza está mal colocada en el soporte para la cabeza y se inclina, las imágenes de CT se podrán ver con diferentes números e intensidades en los extremos de dos interfaces de rotación. Asegúrese que el paciente está en la posición adecuada en el soporte para la cabeza, no colocado de manera que la cabeza esté en la unión del soporte para la cabeza con la camilla. Si es necesario repetir una exploración, asegúrese que las ubicaciones con intensidades diferentes están en el centro de la colimación del haz. No la repita utilizando exactamente la misma prescripción

ADVERTENCIA: Para una mesa de 500 libras, no ponga a un paciente en la mesa (salvo si se trata de una mesa de alta capacidad) que pese más del límite superior de 500 libras (227kg). Si se supera este peso, la mesa podría romperse y provocar la caída del paciente.

Capacidad de la mesa

Para la mesa Optima CT540 Series

Para la mesa de 500 libras, hasta 500 lb. (227 Kg.) con $\pm 0,25$ mm exactitud posicional garantizada.

El peso concentrado de pacientes de baja estatura y corpulentos puede hacer que el soporte entre en contacto con el estativo.

- Asegúrese de que la camilla no toca la cubierta del estativo.
- Asegúrese de no pillar la piel o las extremidades del paciente entre el soporte y el estativo.

CUIDADO: Si utiliza la luz de alineación del láser externo para colocar a los pacientes, recuerde que la elevación del paciente puede ser ligeramente inferior con la camilla extendida que con la camilla totalmente replegada. Esto se debe a que la camilla puede doblarse ligeramente debido al peso del paciente. Es preciso tener presente esta diferencia en aquellas aplicaciones en las que la información sobre la posición del paciente sea de vital importancia, por ejemplo, al planear el tratamiento. Para minimizar los efectos que esto pueda causar, antes de utilizar un sistema de alineación del láser externo para colocar el paciente, haga avanzar al paciente hasta el plano de exploración

E
 GE Healthcare Argentina S.A.
 Avenida...
 ...
 ...

[Signature]
 MARCELO GADALDO
 COORDINADOR TÉCNICO
 GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

de CT. Active las luces de alineación de CT para determinar si se alinean con los marcadores del paciente. Si fuese necesario, compense el doblamiento de la camilla elevando la mesa. Cuando estén alineadas la luces de alineación de CT con los marcadores, establezca el punto de referencia de la exploración utilizando la luz de alineación del láser interna.

CUIDADO: Cuando esté utilizando accesorios de colocación del paciente, asegúrese que no haya áreas que puedan causar un punto de compresión o interferencia con el IV o tubo del paciente.

CUIDADO: Asegúrese de que el inyector eléctrico tiene el suficiente tubo IV como para permitir que la mesa se pueda mover con facilidad. Asegúrese de que la unidad no interfiere con el avance de la mesa.

Asegúrese que el exceso de tubo esté asegurado a la parte superior de la mesa. NO realice bucles adicionales del tubo IV entre los dedos del paciente.

• Compruebe la longitud de todos los tubos clínicos (el tubo de oxígeno, el de la perfusión, etc.) y asegúrese de que sea la correcta para permitir el desplazamiento de la camilla.


Coloque estos tubos de modo que no se enganchen con ningún elemento del entorno del paciente ni entre la mesa y el estativo durante el movimiento de la camilla o la inclinación del estativo.

CUIDADO: Las tiras de colocación del paciente que se proporcionan con el sistema no aguantan todo el peso del paciente. Las tiras de colocación del paciente deben utilizarse para ayudar a colocar al paciente y no están diseñadas para sujetarlo totalmente.

CUIDADO: Debe tenerse cuidado para asegurar que las tiras de colocación del paciente, las prendas del paciente u otro material no queden atrapados durante el movimiento de la mesa.

• El rango explorable no se indica por la marca negra en la mesa, el rango explorable se indica por el botón de límites de inclinación y movimiento en los controles del estativo.

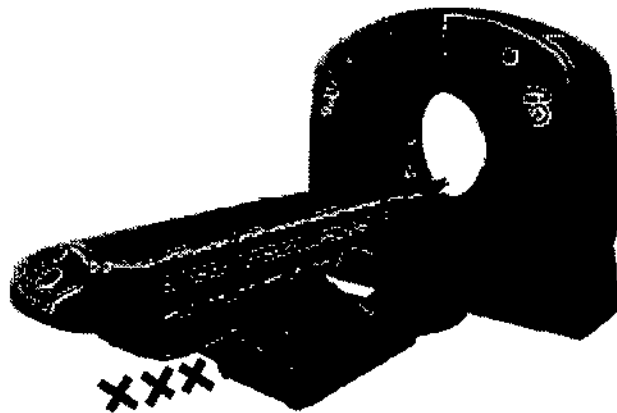Figura 2-18



CUIDADO: Si la mesa se baja con cualquier cosa en el área de la X roja tal y como se ha indicado anteriormente, la mesa puede resultar dañada junto con el equipo o los objetos que estén debajo de la mesa.

CUIDADO: Físicamente ayude a todos los pacientes a acostarse y levantarse de la mesa y a colocarse correctamente en la camilla.

E

Mario Micucci
Gerente
GE Healthcare

CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

CUIDADO: Los pedales en la base de la mesa para subir y bajar a los pacientes están siempre activos. Debe tenerse cuidado de no activar los pedales una vez que el paciente ha sido colocado en la camilla y el examen comenzado.

- Coloque de nuevo el estativo en posición vertical (0 grados), asegure la camilla y ajuste la mesa a una altura cómoda para subir y bajar al paciente.
- Asegure la parte superior de la mesa antes subir o bajar al paciente (el indicador de desbloqueo de la parte superior de la camilla se ilumina cuando está desbloqueada la camilla).

ADVERTENCIA: Para evitar que las extremidades del paciente se pellizquen o aplasten, manténgalas alejadas de la orilla de la camilla móvil y su equipo circundante, y entre la base de la mesa y los paneles laterales.

(Extreme las precauciones cuando coloque a pacientes físicamente grandes).

ADVERTENCIA: Para evitar pellizcar o aplastar al paciente, cuidadosamente observe en todo momento el equipo y el paciente durante la inclinación del estativo o el movimiento de la mesa. Si se produce movimiento no deseado o no se detiene, presione los botones de parada de emergencia de la consola o del estativo.

ADVERTENCIA: El reposacabezas puede romperse, causando lesiones en el cuello o la cabeza, si el paciente se agarra a él durante la colocación. El reposacabezas y la extensión de la camilla soportan un peso máximo de 34 Kg. (75 libras). Pida a los pacientes que se suban hasta el apoyacabezas o ayúdeles a colocarlos en la posición correcta.

CUIDADO: El reposacabezas del paciente o el extensor de la mesa debe asegurarse debidamente para garantizar la estabilidad. Si no están debidamente sujetos, se puede producir una degradación en la calidad de las imágenes debido al movimiento del soporte o extensor.

CUIDADO: EL DETECTOR Y EL DAS ROTAN PARA COLOCAR LAS LUCES DE ALINEACIÓN EN LOS PUERTOS LÁSER. Por ello debe tenerse especial cuidado para supervisar cualquier movimiento de subida/bajada, extracción/retracción o inclinación de la mesa o el estativo, para evitar el contacto del accesorio extendido con el estativo.

Figura 2-19 Aviso sobre accesorios



CUIDADO: No golpee el accesorio contra el estativo. El paciente podría sufrir lesiones o podría dañarse el equipo.

NOTA: Sensores de colisión se colocan bajo las superficies de la mesa para detener movimientos hacia abajo y minimizar los efectos de un choque en la mayoría de los casos. Movimiento hacia arriba aún está permitido si se ha activado un sensor de colisión.

- Compruebe la placa de fijación de accesorios montada en el extremo de la camilla. Repárela o cámbiela si está floja o dañada.

M. Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCO GAROFALO
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

14028



- Utilice el apoyo extensible para que el paciente pueda reposar sobre él su cabeza o los pies durante una exploración.

Optima CT540 Series

Para una mesa de 500 libras:

Para sacar al paciente del estativo en caso de emergencia, la camilla se puede sacar manualmente aplicando un mínimo de fuerza de 60 lb (267 N).

El muestreo temporal puede degradarse debido a cambios en la sincronización para que la mesa se mueva de ubicación a ubicación si no se siguen métodos adecuados de posicionamiento. Asegúrese que el paciente esté colocado en forma segura en la mesa y que los brazos no cuelguen por el borde de la misma, ni permita que la ropa, sábanas o mantas queden atrapadas, lo que podría provocar un problema con el desplazamiento de la mesa.

ADVERTENCIA: El intervalo temporal para las imágenes supera los 3.2 segundos. El uso de estos datos para procesar los mapas de perfusión CT puede contener errores en la información funcional.

Seguridad de láseres (Referencia 21CFR 1040.10 (h))

Está disponible un sistema de luz de alineación de láser para definir con precisión la región de exploración del paciente.

ADVERTENCIA: EL HAZ LÁSER PUEDE PROVOCAR LESIONES OCULARES.

Indique a todos los pacientes que cierren los ojos antes de ENCENDER las luces de alineación.

- Indique a los pacientes que deben mantener los ojos cerrados hasta que apague (OFF) las luces de alineación.

NOTA: Vigile de cerca a los niños y a los enfermos para evitar que miren directamente al haz.

CUIDADO: El detector y el DAS giran para colocar las luces de alineación en los puertos láser.

- Mantenga las manos lejos de la apertura del estativo.

- Asegúrese de que las cubiertas laterales del estativo estén en su lugar.

CUIDADO: El uso de controles o ajustes, o la realización de procedimientos distintos a los especificados puede provocar una exposición a la radiación peligrosa.

• El indicador del panel de visualización del estativo se ilumina al encender las luces de alineación.

• Se brindan en el estativo etiquetas de advertencia sobre seguridad láser, según lo descrito en la sección Etiquetas y símbolos de advertencia.

Orientación de la imagen reconstruida

CUIDADO: Si desea reconstruir imágenes, debe primero utilizar los archivos presentes en el disco. Ya sea que guarde los archivos de exploración que planea reconstruir en forma retrospectiva, o reconstruya archivos de exploración que no han sido salvados antes de que el sistema les escriba encima con los nuevos datos de exploración. El


Mario Micucci
Gerente de Ventas
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO PROFALO
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

sistema no elimina los archivos de exploración protegidos. No olvide liberar los archivos de exploración reservados una vez que terminó las reconstrucciones retrospectivas.

CUIDADO: La reconstrucción de las imágenes de CT de GE se realiza con una orientación desde los pies del paciente. La orientación reconstruida es la de la imagen instalada en la base de datos de la imagen y es la de las imágenes conectadas con una estación de visualización remota.

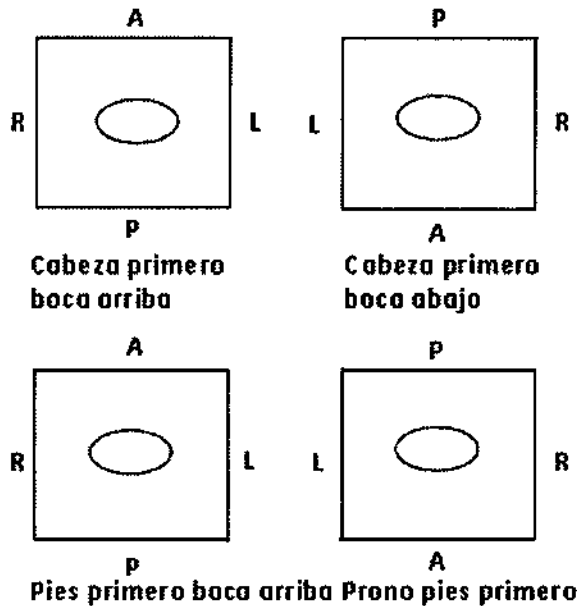Figura 2-20 Orientación del paciente



Los datos sobre la posición del paciente almacenados en el encabezamiento de la imagen reflejan correctamente la información de orientación (RAS) para el paciente. Las aplicaciones de visualización reflejarán la posición derecha (R), izquierda (L), anterior (A) y posterior (P) del paciente.

La orientación de la imagen reconstruida puede ser diferente de la presentación de la vista anatómica preferida en la cual el costado derecho del paciente está en la parte izquierda del observador y su costado izquierdo en la parte derecha del observador. Por ejemplo, cuando se explora al paciente Prono y cabeza primero, la izquierda del paciente está a la izquierda del observador, y la derecha del paciente está a la derecha del observador. La presentación de la imagen tendrá que modificarse para que muestre la visualización anatómica preferida. Es posible que algunas estaciones de visualización no cuenten con la posibilidad de invertir la presentación de las imágenes, pero si la ofrecen, el usuario debe utilizar las herramientas de visualización, por ejemplo, Flip (Invertir), para cambiar la presentación de la imagen.

Algunas estaciones remotas de observación pueden tener la capacidad de establecer protocolos de observación predeterminados, esto es otra herramienta que puede utilizarse para establecer una presentación anatómica de observación.

Las aplicaciones de post procesamiento, como Direct MPR, Reformat y Volume Viewer, orientan automáticamente las imágenes en la presentación anatómica. Estas aplicaciones crean imágenes axiales en la presentación anatómica. Consulte Aplicaciones automáticas (Opción) para obtener mayor información. El sistema también proporciona la posibilidad de crear objetos de estado de presentación de escala de grises (GSPS) para invertir la orientación de la imagen.

Mario Micucci
Parada
GE Healthcare Argentina S.A.

Roberto Garofalo
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



14028

Flip/Rotate (Girar/Rotar) en recon puede utilizarse para generar imágenes donde derecha/izquierda o anterior/posterior estén giradas o donde tanto D/I como A/P hayan sido giradas para cumplir con la preferencia de presentación de la imagen deseada.

Aparece una ventana de atención en Confirm para series en las que se ha seleccionado girar/rotar en reconstrucción. A la atención de: Esta prescripción de la exploración utiliza una de las opciones de giro o rotación de imagen basada en la reconstrucción. Asegúrese de que esta orientación de la imagen prescrita se muestre en forma adecuada en todos los dispositivos de visualización remota.

Esta prescripción de la exploración utiliza una de las opciones de giro o rotación de imagen basada en la reconstrucción. Asegúrese que la orientación de la imagen prescrita se muestre en forma adecuada en todos los dispositivos de visualización remota.

Seguridad de los datos

Para garantizar la seguridad de los datos:

- Compruebe y registre la identificación del paciente antes de comenzar la exploración.
- Observe y registre la orientación del paciente, su posición y las marcas anatómicas antes de comenzar la exploración. Asegúrese de que el paciente está en la posición correcta según los parámetros de exploración.
- Mantenga la calidad de las imágenes del sistema realizando un control de calidad diario y otras operaciones de mantenimiento.

Conectividad - Compruebe siempre que se han recibido correctamente los datos transferidos a otro sistema.

CUIDADO: Los datos o los procedimientos erróneos pueden causar una interpretación incorrecta o un error de diagnóstico.

CUIDADO: Al ingresar la información de ID de paciente, el sistema puede contener muchas instancias de dicha ID de paciente. Los registros múltiples de horarios pueden deberse a diferentes procedimientos pedidos bajo diferentes números de acceso o registros nuevos y terminados en el horario del paciente para la misma ID de paciente.

Cuando ingrese la información de identificación del paciente, verifique que el número correcto de adhesión y la descripción del estudio seleccionados son los deseados. Si realiza la exploración utilizando un número de acceso incorrecto, puede tener problemas para reconciliar los exámenes en un sistema PACS. Consulte el capítulo Programar pacientes para obtener más información.

CUIDADO: El sistema mostrará un mensaje de advertencia cuando el espacio en disco esperado necesario para guardar los datos de la exploración del examen prescrito sea insuficiente.

CUIDADO: El sistema mostrará un mensaje de advertencia cuando el espacio para imágenes esperado necesario para guardar las imágenes de la reconstrucción prescrita sea insuficiente.

CUIDADO: El sistema mostrará un mensaje de advertencia cuando se interpolen los datos para generar imágenes.

CUIDADO: El sistema mostrará un mensaje de advertencia si hay un fallo durante el archivo de los datos de un paciente.

Micucci
Parada
Argentina S.A.
GE Healthcare

MARCELO GAROFALO
INGENIERO TECNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

14028



CAUTION: El sistema mostrará un mensaje de advertencia si hay un fallo durante el archivo de los datos de un paciente.

CAUTION: El sistema mostrará un mensaje de advertencia donde se interrumpa una exploración debido a un fallo en la cadena de adquisiciones.

CAUTION: El sistema muestra un mensaje de advertencia cuando el sistema tiene poco espacio en el disco. Se debe a que una partición del disco duro está saturada. Quitar las imágenes no ayudará a resolver el problema. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener ayuda con la resuperación. Si reinicia el sistema y ve un mensaje que le pregunta si desea ejecutar storelog, seleccione la opción para quitar los registros.

CAUTION: El sistema muestra un mensaje de advertencia si la orientación de un paciente ha cambiado o no concuerda una vez iniciado el examen.

CAUTION: El sistema muestra un mensaje de advertencia antes de modificar cualquier conjunto de datos existente establecido por una función del software.

CAUTION: No suprima imágenes durante la exploración. Elimine siempre las imágenes durante los periodos de inactividad del sistema. Eliminar imágenes durante la adquisición o la reconstrucción de datos puede bloquear el sistema, lo que precisará un reinicio del mismo o forzar una recuperación de la base de datos.

CAUTION: Guardar imágenes en Interchange (CD/DVD) durante la exploración puede provocar que se salten tiempos entre exploraciones (ISD) largos o puede que no se reproduzca la voz automática. No copie ni restaure imágenes utilizando CD-R o DVD-R durante la exploración.

CAUTION: Cuando compare imágenes de CT de GE con otras imágenes, consulte la declaración de conformidad de DICOM para conocer los valores almacenados de posición de imagen DICOM, marco de referencia UID y ubicación de corte.

CAUTION: Algunos valores de anotación están almacenados en elementos privados de DICOM. Cuando se ven imágenes en una estación remota, es posible que estos valores de anotación no estén incluidos en la imagen. Consulte la declaración de conformidad de DICOM sobre campos de datos privados DICOM.

CAUTION: Si desea reconstruir imágenes, debe utilizar archivos presentes en el disco. Para evitar que el sistema sustituya los archivos con nuevos datos de exploración, proteja los archivos de exploración que planea reconstruir retrospectivamente o bien reconstruya archivos de exploración no guardados. El sistema no elimina los archivos de exploración protegidos. No olvide retirar la protección de los archivos de exploración después de finalizar la reconstrucción.

Aplicación de seguridad de software

CAUTION: No inicie una toma rápida si el sistema está reuniendo datos con la función de rayos X activada.

CAUTION: No inicie la aplicación IQ Snap mientras el sistema está en proceso activo de exploración o reconstrucción de datos.

Temas de seguridad específicos a la aplicación

Exploración helicoidal

MARCELO GAROFALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

Micucci
Argentina S.A.
GE Healthcare

74028

ADVERTENCIA: La exploración helicoidal tiene la capacidad inherente de producir artefactos cuando explora partes anatómicas de gran inclinación, por ejemplo, la cabeza. Algunos factores que pueden agravar este problema son: más altas velocidades de la mesa, mayor espesor de la imagen e inclinación de estativo. En algunos casos, estos artefactos pueden confundirse con una hemorragia cercana al cráneo, o un espesamiento del mismo.

Para reducir en lo posible la aparición de estos artefactos, puede prescribir velocidades de mesa más bajas y/o cortes más delgados (por ejemplo, 2,5 mm) para exploraciones helicoidales cercanas al vértice de la cabeza.

ADVERTENCIA: En la literatura radiológica se ha documentado que puede ocurrir un artefacto en el tórax que presente doble margen de los vasos grandes, lo que aparece como una disección del vaso durante las exploraciones de 0.5 a 1.0 segundos. Esto puede ocurrir en las exploraciones axiales o helicoidales. Si ha realizado una exploración axial o helicoidal con 0.5 a 1.0 segundos de tiempo de rotación y observa este fenómeno, vuelva a explorar el área con una exploración axial de 2.0 segundos para verificar si se trata de un artefacto o de una patología del paciente. Puede utilizar el modo de reconstrucción de segmento para las adquisiciones helicoidales y de cine en reconstrucción retrospectiva para también evaluar si existe un artefacto o una patología.

Algoritmo de pulmón

- Los ajustes del algoritmo de pulmón proporcionan un realce de bordes entre estructuras con grandes diferencias de densidad, como el calcio y el aire, lo que da como resultado un campo de pulmón más nítido en comparación con el algoritmo estándar.
- Para una mejor calidad de imagen, prescriba espesores de 5 mm si planea usar el algoritmo de pulmón. Si planea prescribir un estudio pulmonar de alta resolución con 3.75, 2.5 o 1.25mm, utilice el algoritmo óseo.
- El ajuste de pulmón mejora el contraste de objetos pequeños. Para obtener una calidad de visualización y fotografiado óptima, seleccione un ancho de ventana entre 1.000 y 1.500 y un nivel que oscile entre -500 y -600.
- El ajuste del algoritmo de pulmón aumenta los valores del número de CT en el borde de objetos de alto contraste. Si desea tomar medidas del número de CT de vasos o nódulos en el pulmón, compruebe y compare sus resultados con las imágenes del algoritmo estándar. (Las funciones ROI e Histograma utilizan números de CT.)
- **Recuerde:** puede ocurrir que el realce de bordes facilitado por el algoritmo de pulmón no resulte apropiado en ciertos casos clínicos. Tenga en cuenta las preferencias de visualización individuales al seleccionar este algoritmo.

Auto exploración

- Presione y suelte **Move to Scan** (Mover para explorar) en la consola para avanzar la camilla.
- Si la función de exploración automática no está activada, es necesario presionar **Move to Scan** para cada exploración para que **Start Scan** esté listo.
- Si selecciona Auto Exploración durante un grupo de rayos X, esta opción permanece activa (ON) para cada grupo de esa serie.

Seguridad para SmartStep/SmartView

M. Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GAROFALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



14028

La opción SmartStep//SmartView agrega diversos componentes a la sala de exploración. Se incluyen: In-Room Monitor (Monitor de sala), Hand Held Control (Control de mano) para el movimiento de mesa y la revisión de imágenes, y X-Ray Control Foot Switch (Control a pedal de rayos X)

Cada uno de los componentes de SmartStep/SmartView está conectado al sistema por un cable. Cuando utilice el sistema, asegúrese de que los cables no se enreden o atasquen al retirar el estativo o la mesa.

Mesa flotante

Durante la exploración, el personal tiene la opción de hacer "flotar" la mesa entre exploraciones. Al seleccionar el modo Table Float (Mesa flotante), la mesa se desbloquea y puede moverse libremente de forma manual.

ADVERTENCIA: El movimiento no deseado de la mesa puede ocasionar alguna lesión grave. La mesa puede ser golpeada o chocar durante un procedimiento quirúrgico. Debe tenerse cuidado al realizar procedimientos quirúrgicos en el modo de mesa flotante. Es responsabilidad del profesional asegurarse de tener el control total de la mesa cuando esté en este modo de funcionamiento. La mesa no debe quedar sin vigilancia cuando esté en el modo flotante. Asegúrese de que la mesa esté sujeta antes de retirarse de su lado.

Exploraciones SmartStep/SmartView

Las exploraciones SmartStep permiten llevar a cabo varias exploraciones en un mismo lugar para procedimientos de intervenciones. El sistema permite hasta 90 segundos de exploración en un mismo lugar. Transcurridos 90 segundos, el operador debe prescribir una nueva exploración para continuar. El tiempo de exploración acumulado en un procedimiento se muestra en el monitor del interior de la sala.

CUIDADO: El tiempo de exposición al paciente puede ser de hasta 90 segundos por confirmación comparada de 60 o 120 (opción) segundos para todos los otros modos de exploración.

CUIDADO: La exposición prolongada a los rayos X sobre una misma zona puede causar enrojecimiento o quemaduras por radiación. El usuario debe conocer las técnicas y tiempos de exposición correctos para garantizar la seguridad del procedimiento.

CUIDADO: El pedal está activo si el sistema está en el estado "Prepped" (preparado). Debe tenerse cuidado de no presionar el pedal y producir una exposición no deseada.

CUIDADO: Los cables para el controlador manual y el pedal integrados incluidos con las opciones SmartView y SmartPrep pueden provocar tropiezos. Asegúrese de que estos cables no quedan atrapados al mover el estativo o la mesa y que no se interponen al subir o bajar al paciente.

El personal que trabaje en la sala de exploración debe llevar ropas de protección. En el catálogo de accesorios de GE se encuentran disponibles delantales emplomados, protección para la zona genital y tiroidea, así como protección ocular.

Exploración intervencionista / biopsia

Miguel...
Gerada
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCOLO GAROFALO
CO-DIRECTOR
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

14028


CUIDADO: El formato de AutoView continuo no debe utilizarse para mostrar imágenes durante un estudio intervencionista porque no permite la revisión rápida de las imágenes de manera rápida en una ventana de vista libre.

ADVERTENCIA: Al explorar para estudios intervencionistas (biopsia), el modo de exploración, el espesor de la imagen, el número de imágenes por rotación y la configuración de vista afectan la velocidad de visualización de las imágenes. Se recomienda utilizar el modo biopsia proporcionado en el sistema. Si manualmente se prescriben exploraciones de biopsia, se debe usar el modo de exploración Axial 1i, o el modo Helicoidal con un espesor de corte mayor a 2.5 mm. No utilice el modo de exploración Cine para la captura de imágenes intervencionistas (Biopsia). No utilice un formato de vista automático con más de un puerto de vista de imagen Auto View.

Consulte Seleccionar una pantalla de imagen múltiple en el Área de visualización de la pantalla de imagen capítulo de la guía de aprendizaje y referencia si desea obtener más información sobre cómo configurar las opciones de visualización deseadas.

Elija una de las siguientes opciones para obtener los mejores formatos de visualización automática

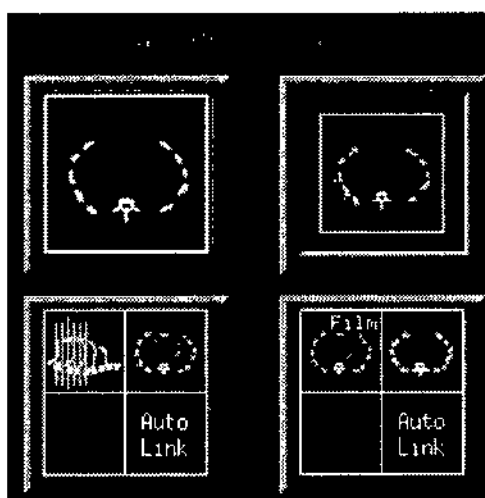Figura 2-22 Formatos Auto Vista



Seguridad de aplicaciones avanzadas

CUIDADO: Las reconstrucciones 3D o de sección proporcionan información complementaria adicional, complementando diagnósticos que deberían estar basados en técnicas clásicas.

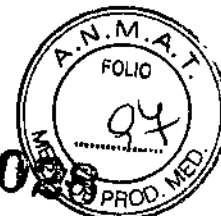
ADVERTENCIA: Las imágenes que no se obtienen con equipos GE pueden cargarse en Volume Viewer pero GE no garantiza la calidad ni confiabilidad de cualquier reconstrucción, segmentación o medidas llevadas a cabo en estas imágenes. Las imágenes que no se obtienen con equipos GE pueden identificarse fácilmente a través de la anotación correspondiente en la imagen.

Siga las instrucciones generales para los parámetros de adquisición DICOM enumeradas en la guía del usuario de cada aplicación.

ADVERTENCIA: Antes de utilizar una herramienta de segmentación (umbral, bisturí, eliminar y conservar objeto, selección automática, filtros de "motas", etc.) asegúrese siempre de que no eliminará patologías u otras estructuras anatómicas fundamentales

M. rina Micucci
Gerada
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO MICUCCI
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



14028

ADVERTENCIA: Cuando utilice alguna herramienta de segmentación (selección automática, umbral, pintar en corte, pintura rápida, etc.) verifique los contornos para comprobar la confiabilidad de la segmentación.

Asegúrese de que los contornos coincidan con la segmentación y los volúmenes correctos. Verifique que los volúmenes segmentados coincidan con los contornos.

Measurements (Medidas)

ADVERTENCIA: No utilice las vistas 3D o de sección únicamente para realizar mediciones (distancia, ángulo, región de interés, cursor de informes, área, volumen, etc.). Verifique siempre la posición de los puntos de medición y remítase a las vistas basales 2D (imágenes adquiridas o imágenes reformateadas de espesor mínimo) para confirmar las mediciones.

CUIDADO: El programa calcula y muestra mediciones con una resolución de un decimal (como 0,1 mm; 0,1 grado, etc.). Debe tener en cuenta que la precisión real de las mediciones generalmente es menor por diferentes razones (resolución de la imagen, condiciones de adquisición...).

Las medidas de distancia, ángulo y superficie sólo son válidas si todos los segmentos trazados son más largos que la distancia entre cortes.

ADVERTENCIA: Según las configuraciones de WWWL, los objetos pueden mostrarse en forma diferente. Verifique WLWW antes de depositar los puntos de medición.

CUIDADO: Cuando filme o guarde imágenes con fines de diagnóstico, asegúrese siempre de que el nombre del paciente y la información sobre la geometría se muestre en todas las vistas y coincida con la información en la vista de referencia.

CUIDADO: Cuando guarde imágenes con la descripción de una nueva serie, asegúrese que esta descripción coincida con las imágenes guardadas.

ADVERTENCIA: Verifique con conjuntos de datos originales la confiabilidad de las segmentaciones y las mediciones llevadas a cabo en objetos guardados después del post procesamiento y recarga.

Herramientas de segmentación

ADVERTENCIA: Antes de utilizar una herramienta de segmentación (umbral, bisturí, eliminar y conservar objeto, selección automática, filtros de "motas", etc.), asegúrese siempre de que no eliminará patologías u otras estructuras anatómicas fundamentales.

ADVERTENCIA: Cuando utilice alguna herramienta de segmentación (selección automática, umbral, pintar en corte, pintura rápida, etc.) verifique los contornos para comprobar la confiabilidad de la segmentación.

Asegúrese de que los contornos coincidan con la segmentación y los volúmenes correctos. Verifique que los volúmenes segmentados coincidan con los contornos.

Guardar y filmar imágenes

CUIDADO: Cuando filme o guarde imágenes con fines de diagnóstico, asegúrese siempre de que el nombre del paciente y la información sobre la geometría se muestre en todas las vistas y coincida con la información en la vista de referencia.

M. Micucci
Gerente
GE Healthcare - Argentina S.A.

MARCELO GATZEMBO
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



14026

CUIDADO: Cuando guarde imágenes con la descripción de una nueva serie, asegúrese que esta descripción coincida con las imágenes guardadas.

CUIDADO: Verifique con conjuntos de datos originales la confiabilidad de las segmentaciones y las mediciones llevadas a cabo en objetos guardados después del post procesamiento y recarga.

Fiabilidad de la imagen

CUIDADO: Las reconstrucciones 3D o de sección proporcionan información complementaria adicional, complementando diagnósticos que deberían estar basados en técnicas clásicas.

ADVERTENCIA: Siempre compruebe cualquier información (posición del cursor, orientación de la imagen, mediciones, calidad de la imagen, etc.) en las reconstrucciones 3D (plano reformateado, oblicuo, MPVR, MIP, interpretación del volumen, vistas endoluminales del navegador, curvas, segmentaciones, mediciones, seguimiento, imágenes guardadas, etc) con los datos originales (imágenes adquiridas o basales).

ADVERTENCIA: Una vista en 3D es una proyección bidimensional en la pantalla del volumen en 3D. En una vista en 3D, no hay ninguna indicación del nivel de "profundidad" al que se encuentra el cursor 3D dentro del volumen 3D. Siempre compruebe la precisión y consistencia de las coordenadas 3D verificando la posición del cursor en los datos originales (imágenes adquiridas).

Ancho y nivel de ventana

ADVERTENCIA: El ancho y el nivel de ventana (W/L) determinan la claridad con que se pueden discernir las patologías y otras estructuras anatómicas. Las configuraciones de W/L incorrectas pueden hacer que no se muestren correctamente las patologías y otras estructuras anatómicas esenciales.

Dado que una sola configuración de W/L no puede mostrar todas las características presentes en un examen, utilice diferentes configuraciones, cuando sea necesario, para analizar todos los datos del examen.

Reconstrucción de volumen

ADVERTENCIA: Cuando utiliza la interpretación del volumen, la configuración incorrecta de la curva de opacidad, el umbral de opacidad y la configuración de transparencia cuando fusiona objetos VR pueden traer como resultado que las patologías o secciones anatómicas esenciales no sean visibles.

Siempre compruebe las imágenes de interpretación del volumen con las imágenes originales.

Calidad de la imagen

ADVERTENCIA: En todo momento, es responsabilidad del médico determinar si la distancia entre cortes utilizada para un examen determinado es adecuada.

ADVERTENCIA: La carga de píxeles no cuadrados dará como resultado una mala calidad de la imagen.

Micucci
herada
Argentina S.A.

MARCELO CARRELLI
COORDINADOR DE ATENCIÓN
GF HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



14028

ADVERTENCIA: Se proporciona un valor predefinido del mapa de colores en una placa predeterminada con fines informativos. Debe verificar y ajustar los valores y los nombres de segmentos.

Precisión de las mediciones

Medir la distancia para imágenes axiales, helicoidales y Cine CUIDADO: Esta sección incluye información sobre la precisión de las medidas utilizadas al revisar imágenes.

El error de la medida, si se usa la gráfica de distancia de línea recta, es inferior a 2 veces el tamaño del píxel de la imagen.

CUIDADO: Por otra parte, las medidas son exactas sólo si los segmentos de trazo son superiores al intervalo de los cortes.

Medir la distancia para imágenes Scout

La precisión de las medidas para las imágenes de reconocimiento en dirección "X" varía con el espesor del objeto y su distancia al isocentro en la dirección "Y". Observe que las orientaciones "X" e "Y" en Figura 2-23 a continuación asumen que el plano de exploración de reconocimiento es de 0 grados. Si se rota el plano de reconocimiento, las orientaciones de "X" e "Y" cambian de acuerdo con él.

- Para medidas de anatomía en la dirección "X" que están en el isocentro ("Y"):

- El error de medición al emplear el gráfico de línea recta es menos del 5 % de la distancia medida más 2 mm.

- Para las medidas de la anatomía en dirección "X", que NO están en el isocentro ("Y"):

- El error de medición al emplear el gráfico de línea recta es menos del 5 % de la distancia medida más 2 mm más 3 % de la distancia medida por centímetro del ISO centro.

- Para medir la anatomía en la dirección "Z":

- El error de la medida, si se usa la gráfica de distancia de línea recta, es inferior a 2 veces el tamaño del píxel de la imagen.


M. Micucci
Gerada
Healthcare Argentina S.A.


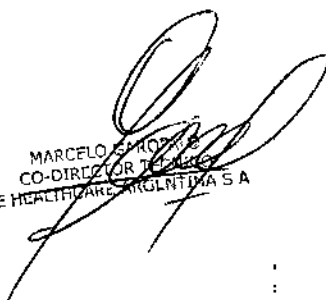

MARCELO S. ROSSI
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

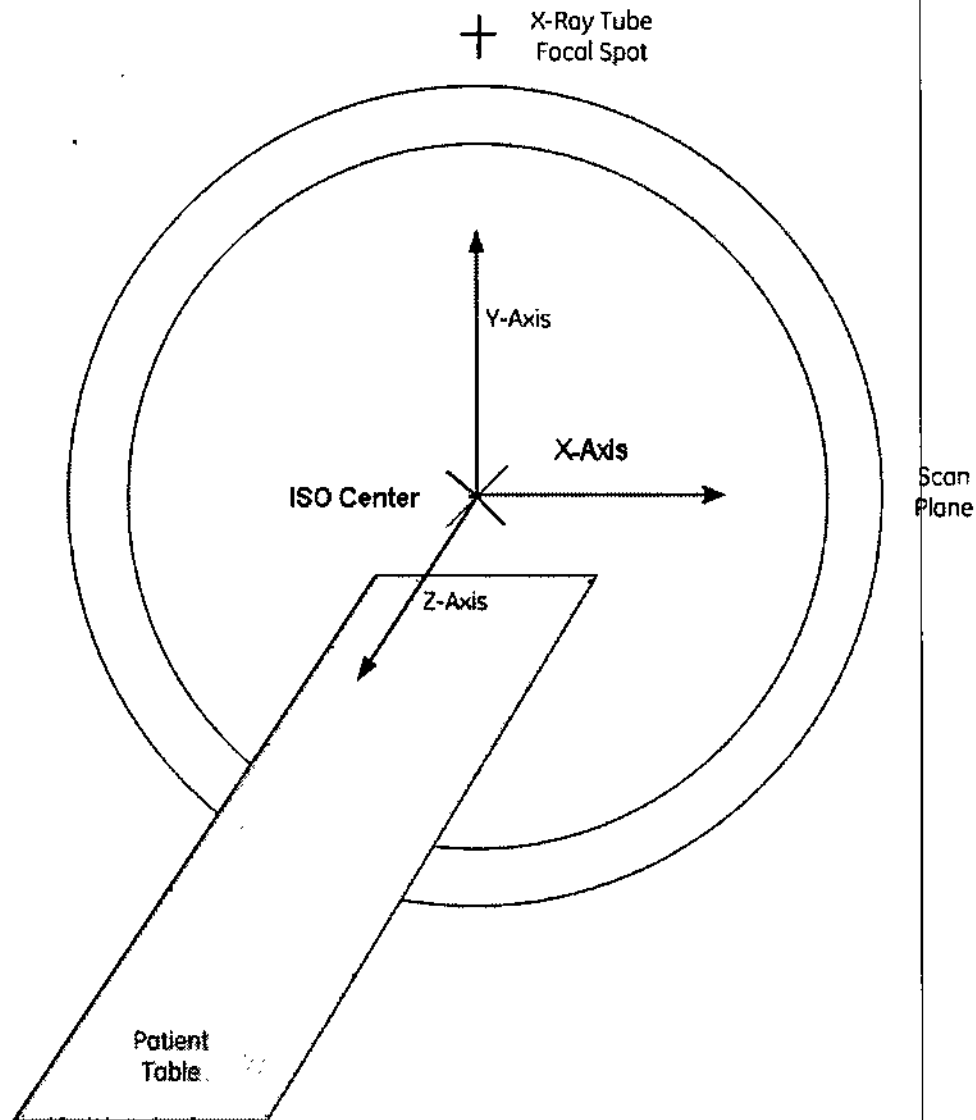Figura 2-23 Plano de exploración de reconocimiento



Mida el ángulo

La precisión de la medida utilizando un gráfico de ángulo es igual al valor del ángulo visualizado +/- 10 grados para un ángulo medido entre segmentos que son cinco veces mayores que el tamaño de píxel de la imagen. La precisión mejora conforme aumenta la longitud del segmento.

ROI

La precisión de las mediciones de zonas que emplean una región de interés (rectángulo, curva suave, elipse o dibujo a mano alzada) es igual al área mostrada +/- la circunferencia de la región multiplicada por (el tamaño píxel de la imagen) $2/2$. Los valores de desviaciones medias y estándar para la intensidad de los píxeles en la región también se ven afectados por esta precisión. Si se rota la ROI, la medida del área puede variar hasta un 5%. Las estadísticas de la región de interés se basan en los píxeles DENTRO de la gráfica que define la región.

Espesor del plano de reformateo

El espesor del plano de reformateo es igual a 1 píxel.

- Si cada píxel axial representa 0.5 mm de anatomía, el reformateo del espesor de plano es igual a 0.5 mm.
- Si el tamaño del píxel es de 0,9766 mm (500 mm/512), el reformateo del plano representa una sección de anatomía de aproximadamente un milímetro de espesor.

CUIDADO: Los números de CT NO son absolutos, por lo que puede producirse un error de diagnóstico. Las variables del sistema y el paciente pueden influir en la precisión del número de TC. Si éste es su única referencia, y no tiene en cuenta las variables siguientes, podría emitir un diagnóstico erróneo sobre una imagen.

CUIDADO: La resolución límite de medida del cursor es de 1 mm, es decir, la distancia inferior a 1 mm pero superior a 0.5mm se redondea a 1 mm, por lo que la precisión de esta prueba está limitada por la capacidad de medida del cursor.

Esto es particularmente importante para las medidas de cortes finos con un FWHM cercano a los 0.625 mm. Los resultados de estas imágenes de cortes finos no serán tan precisos como los de cortes gruesos. Esta es la limitación de este método.

Ergonomía de la consola del operador

Para conseguir un uso óptimo del sistema y reducir la probabilidad de tensión física y fatiga, se recomienda seguir los pasos descritos a continuación acerca de cómo usar su consola de operador:

Postura

Es muy importante mantener una postura correcta. Para ello, cumpla estos puntos básicos cuando se sienta frente a la consola:

1. Mire a los monitores y teclado sin torcer el cuerpo.
2. Adopte una postura erguida, con la parte inferior de la espalda bien apoyada.
3. Coloque los antebrazos paralelos al suelo, con las muñecas rectas.
4. Sitúe la pantalla de modo que los ojos estén a la altura de la parte superior de ésta.
5. Mantenga los pies apoyados en el reposapiés, con los muslos paralelos al suelo.

Si no se siente cómodo en esta posición cuando trabaje en la consola, realice los ajustes necesarios en el entorno de la misma.

Ajustes del equipo

Silla

Para obtener una posición cómoda, es muy importante ajustar la altura y posición de la silla. Realice los siguientes pasos:

1. Ajuste el respaldo contra la espalda. Si tiene las piernas cortas puede necesitar una almohadilla para la espalda.
2. Fije la altura de la silla de modo que los antebrazos estén paralelos al suelo cuando tenga las manos en el teclado. Si le cuelgan los pies, necesita un reposapiés.

Teclado



14026

La altura del teclado también es importante. Cuando escriba:

- Las muñecas deben estar lo más derechas posible.
- Los antebrazos deben estar paralelos al suelo.
- Las manos y los dedos deben estar un poco por encima del teclado o el mouse.

Criba

- La distancia de visualización recomendada desde la pantalla es de 18 a 20 pulgadas o 45 a 70 centímetros.
- Con la cabeza recta, los ojos deben mirar directamente a la parte superior de la pantalla.
- Mire la pantalla de frente, no desde un ángulo lateral, superior o inferior.
- El brillo de la pantalla puede deformar la visión y provocar fatiga ocular. No se sitúe frente a una ventana, y coloque la pantalla en un ángulo correcto con respecto a fuentes de luz directa.

Comodidad

Si se encuentra cómodo en su consola del operador significa que ha ajustado su área de trabajo correctamente. No obstante, un área bien adaptada necesita ajustes frecuentes, especialmente para usuarios distintos. Tómese el tiempo necesario para asegurar su comodidad cuando se coloque en la consola.

Si emplea la consola durante largos periodos (varias horas), es recomendable que haga pausas y realice ejercicios de estiramiento sencillos para reducir el riesgo de cansancio.

Otras consideraciones:

- Preste atención al estado del paciente.
- Utilice los altavoces y micrófonos de la mesa, el estativo y la consola para mantener una comunicación constante, incluso cuando esté sentado en la consola.
- Siga los procedimientos de examen descritos en los capítulos 13 y 14 del Manual de aprendizaje y referencia. Introduzca con cuidado la información y posición del paciente antes de comenzar.

Sistemas con camillas y accesorios sin metal

CUIDADO: Evite causar daños en los accesorios sin metal! Inspeccione cuidadosamente el dispositivo de sujeción sin metal del accesorio y el enganche de la camilla antes de fijar el accesorio por primera vez.

- Para enganchar un accesorio:
 - Alinee la lengüeta del accesorio con el orificio en el extremo de la camilla.
 - Mantenga los dedos alejados de la camilla.
 - Introduzca la lengüeta por completo en el orificio hasta que se enganche.
 - Es posible que se hayan instalado cuñas de goma en el apoyacabezas o el reposapiés para un mejor ajuste. Al enganchar el accesorio, tenga cuidado para que quede bien sujeto. Empuje el pestillo hacia adelante hasta que oiga que encaje.

Verifique que esté bien enganchado.

- Para desenganchar un accesorio:

M. Miucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO BARZANO
CO-DIRECTOR
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.



14028

– Presione las dos partes en forma de L, acercándolas, y extraiga el accesorio de la camilla.

– También puede empujar el enganche en la dirección adecuada para extraer el accesorio de la camilla.

• Utilización correcta:

– Mantenga la lengüeta del accesorio y el orificio de la camilla limpios de flujos y desechos.

– Mantenga el enganche y el orificio de la camilla libres de almohadillas, sábanas, hojas o cualquier elemento que pueda obstaculizar el enganche y causar daños.

• Posicionamiento

– La colocación de la anatomía del paciente sobre la zona en la que el soporte para la cabeza o la extensión se adhiere a la propia camilla puede producir imágenes en las que el contraste entre dos rotaciones adyacentes es diferente. Asegúrese de que el área de interés, especialmente la cabeza, se encuentre bien colocada en el soporte para cabeza o en la extensión de la camilla.

Seguridad del Xtream/Enhanced Xtream Inyectore

CUIDADO: El inyector y el sistema se utilizan de manera independiente después de presionar el botón Start Scan (Iniciar exploración). Cuando desee detener tanto el sistema como el inyector, utilice el botón Stop Scan (Detener exploración) en el sistema SCIM y el de detener función de inyector en el inyector.

CUIDADO: Cuando se utiliza el inyector Xtream con SmartPrep, la inyección no se inicia al principio de la fase de línea de base. Se inicia en la fase Monitor. Si se accede a Scan Phase (Fase de exploración) sin la fase Monitor, el inyector no arrancará.

Configuración limitada de la sala de acceso

CUIDADO: Debido a las limitaciones de acceso en el lateral izquierdo del estativo, algunos procedimientos pueden verse afectados cuando se utilice el equipo auxiliar. Evalúe la colocación del equipo que necesite para el procedimiento antes de colocar al paciente en la mesa. El acceso alrededor del lateral izquierdo del estativo también puede verse afectado.

Dispositivos y actuaciones ante emergencias

Dispositivos de emergencia

El sistema dispone de dos tipos de botones de emergencia:

1. **Emergency Stop (Parada de emergencia):** cuando se pulsa, se detienen cualquier movimiento de la mesa y del estativo, se interrumpe la generación de rayos X y se apagan las luces de alineación del láser. El sistema interrumpe cualquier procedimiento de adquisición de datos en curso y trata de guardar todos los datos adquiridos antes de la interrupción. Utilice el botón de parada de emergencia en el caso de emergencias relacionadas con los pacientes.

2. **System Emergency Off Button (Botón de desconexión del sistema en caso de emergencia):** cuando está pulsado, se interrumpe la alimentación de todos los componentes del sistema, deteniéndose el movimiento de la mesa y el del estativo así como la generación de rayos X. En este caso, el sistema cancela cualquier adquisición que se esté llevando a cabo y los datos obtenidos antes de la cancelación pueden

M. Micucci
Parada
Argentina S.A.

COMITÉ PROFESIONAL
COORDINADOR TÉCNICO
DE NEURORADIOLOGÍA ARGENTINA S.A.

resultar dañados o perderse. Utilice el botón de desconexión del sistema en caso de emergencia si se producen emergencias por catástrofes, por ejemplo, un incendio o un terremoto.

CUIDADO: Si durante una exploración presiona los botones Emergency Stop (Interruptor de emergencia) o Emergency OFF (Desconexión de emergencia), el sistema interrumpirá la adquisición de datos.


Interruptor de emergencia

NOTA: El usuario debe tomarse unos minutos para localizar los interruptores de emergencia en su sistema antes de explorar al primer paciente.

El sistema dispone de cinco botones **Emergency Stop (Interruptores de emergencia):**

– En cada panel de control en la parte delantera del estativo (Figura 2-26).

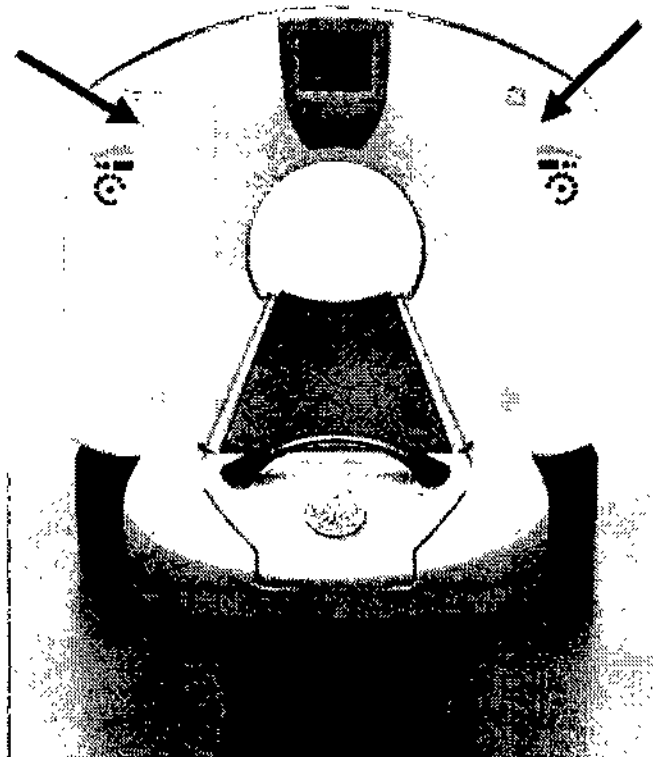
Figura 2-26 Botones interruptores de emergencia al frente del estativo



– Dos en la parte trasera del estativo.

– Uno en el Acquisition Control (Figura 2-27).

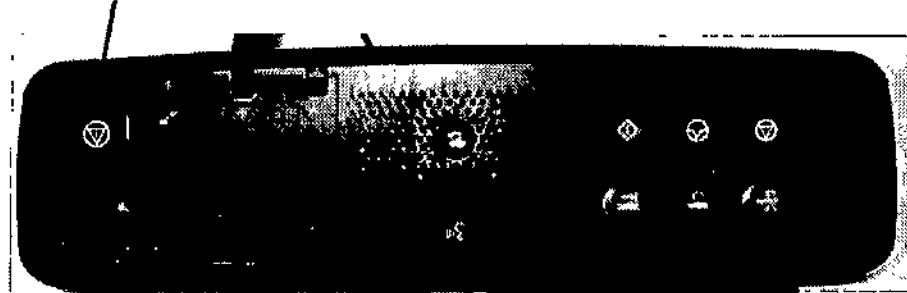Figura 2-27 Botón interruptor de emergencia en el teclado




Oprima un botón interruptor de emergencia en caso de que se produzca una emergencia relacionada con el paciente o si la parte superior de la mesa, la mesa o el estativo empiezan a desplazarse inesperadamente.

- Una vez que se pulsa un botón interruptor de emergencia, el botón Reset (Restablecer), situado en el panel de control del estativo, parpadea aproximadamente una vez cada dos segundos.
- Oprima la tecla del estativo Reset (Restablecer) para restaurar la alimentación del estativo y de la mesa.

Al aplicar el interruptor de emergencia, el de la camilla y el estativo en acción pueden seguir en movimiento por menos de 10 mm y 0.5 grados respectivamente.

Símbolos del botón de interrupción de emergencia

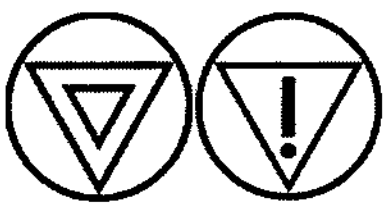Los botones de parada de emergencia pueden incluir uno de estos símbolos



Botones de desconexión del sistema en caso de emergencia mediante el control de desconexión principal

(Si tiene función MDC control principal de desconexión)

En caso de un incendio, una inundación, un terremoto o cualquier otra emergencia catastrófica, todo el suministro eléctrico al sistema completo debe ser apagado/cortado. Al pulsar el botón de desconexión del sistema en caso de emergencia, se interrumpe de forma inmediata el suministro eléctrico del sistema directamente desde el control de desconexión principal (MDC). Puesto que el sistema no tiene tiempo de guardar la información, o cerrarse de modo ordenado, presionar el botón System Emergency OFF puede corromper los archivos del sistema o tener como resultado la pérdida de datos del paciente.

La persona encargada del diseño estructural de las instalaciones determina el número de botones de desconexión en caso de emergencia que deben existir así como dónde ubicarlos.

GE recomienda colocar uno de estos botones cerca de la puerta de entrada de cada sala en las instalaciones de exploración y del sistema. Solicite a su supervisor que le muestre la ubicación dentro de la suite del sistema de los botones de desconexión del sistema en

Marcio Micucci
Gerente
GE Healthcare Argentina S.A.

MARCELO GARZOPALO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.

14028



caso de emergencia Siga las instrucciones de su centro para informar de una emergencia.

Oprima el botón de **desconexión del sistema en caso de emergencia** (botón rojo circular situado en la pared) en el caso de que se produzca una catástrofe como por ejemplo un incendio o un terremoto.

Restablecimiento del botón de desconexión en caso de emergencia

1. Pulse Start (Iniciar) situado en el control de desconexión principal.

- De este modo, se restablecerá el suministro eléctrico en la unidad de distribución de la red eléctrica (PDU), en la consola del operador y en los dispositivos electrónicos del sistema.

2. Pulse la tecla Reset (Restablecer) del estativo en el panel del mismo.

- De este modo, se restablecerá el suministro eléctrico en las unidades del estativo, en el sistema de rayos X y en la mesa.

Atención de emergencia al paciente durante la emisión de rayos X

- Pulse **STOP SCAN (DETENER EXPLORACIÓN)** para detener los rayos X y el movimiento del estativo y la mesa.

- Pulse **PAUSE SCAN (PAUSA DE EXPLORACIÓN)** para hacer una pausa en la exploración después de completar la actual.

- Durante un examen, el sistema hace pausas entre exploraciones si usted oprime cualquier botón del panel de control, salvo las luces de alineación. Detiene los rayos X si oprime el o los mismos botones durante una exploración.

- Seleccione **Resume (Reanudar)** en la misma pantalla para continuar con el examen.

Actuaciones ante emergencias

El funcionamiento del sistema puede interrumpirse por causa de un fallo en el suministro eléctrico o como medida de seguridad (si los sensores anticolidión detectan algo) o bien el operador puede detener el funcionamiento del sistema como respuesta a una situación de emergencia.

El botón de desenganche de la camilla sólo debe usarse en dos situaciones.

1. En situaciones de expulsión de emergencia.

2. Cuando se utiliza el tipo de exploración SmartStep.

Para sacar al paciente de una manera segura:

1. Oprima la tecla de liberar la camilla del estativo o el botón interruptor de emergencia (Figura 2-26) para desbloquear el embrague.

2. Ponga la camilla en su posición de fuera usando el saliente o la manivela de la camilla (Figura 2-26).

3. Ayude al paciente a bajar de la mesa.

M. Micucci
Gerente
GE Healthcare - Argentina S.A.

MARCELO CAROVALO
COORDINADOR TÉCNICO
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.