



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT

"2017 - Año de las Energías Renovables"

DISPOSICIÓN Nº 0387

BUENOS AIRES, 12 ENE 2017

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-5007-16-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones RESPIFLOW S.A. solicita la revalidación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1170-24, denominado: Aspiradores, marca Precision Medical.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT Nº 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y por el Decreto Nº 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1170-24, correspondiente al producto médico denominado:

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 0387

Aspiradores, marca Precision Medical, propiedad de la firma RESPIFLOW S.A., obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 6055 de fecha 06 de Septiembre de 2011, según lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Revalidación el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1170-24, denominado: Aspiradores, marca Precision Medical.


ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulo e instrucciones de uso autorizadas; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Autorización de Revalidación al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-5007-16-1

DISPOSICIÓN N°

PB

0387

  
Dr. ROBERTO LOBO  
Subadministrador Nacional  
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **0387**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1170-24 y de acuerdo a lo solicitado por la firma RESPIFLOW S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre descriptivo: Aspiradores

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Precision Medical

Autorizado por Disposición ANMAT N°: 6055 de fecha 06 de Septiembre de 2011

Tramitado por expediente N°: 1-47-545/11-8

DATO IDENTIFICATORIO	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN/ RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	06 de Septiembre de 2016	06 de Septiembre de 2021
Rótulo	Aprobado por Disposición ANMAT N° 6055/11	A fojas 6
Instrucciones de uso	Aprobados por Disposición ANMAT N° 6055/11	A fojas 7 a 14

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Revalidación del RPPTM a la firma RESPIFLOW S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1170-24, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **12 ENE 2017**

Expediente N° 1-47-3110-5007-16-1

DISPOSICIÓN N°

**0387**

3

**Dr. ROBERTO LEDE**  
Subadministrador Nacional  
ANMAT



0387

12 ENE 2017

Importado por:

Respiflow SA.  
Boulevard García del Río 2477 - Piso 2 CABA - República Argentina

Fabricado por:

Precision Medical, Inc.  
300 Held Drive, Northampton, PA 18067  
Estados Unidos.



ASPIRADOR Modelo: \_\_\_\_\_

Ref #: \_\_\_\_\_

S/N xxxxxxxx



IPX0



*Temperatura de funcionamiento: +10°C a +40°C*  
*Temperatura de almacenamiento y de transporte: -20°C a +40°C*  
*Humedad — funcionamiento, almacenamiento y transporte: < 95% sin condensación*

Directora Técnica: Nancy Denise Oliva Bioq. Mat.Nº: 8236.

**VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**


Producto autorizado por ANMAT PM-1170- 24

E

RESPIFLOW S.A.  
APODERADO

  
Dra. NANCY DENISSE OLIVA  
M. Nº 8236  
BIOQUÍMICA

E

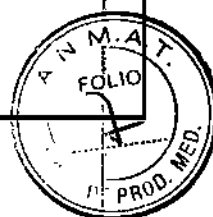Importado por:

Respiflow SA.  
Boulevard García del Río 2477 - Piso 2 CABA - República Argentina

Fabricado por:

Precision Medical, Inc.  
300 Held Drive, Northampton, PA 18067  
Estados Unidos.

**PRECISION MEDICAL**

## ASPIRADOR Easy Go Vac PM65



IPX0



*Temperatura de funcionamiento: +10°C a +40°C*

*Temperatura de almacenamiento y de transporte: -20°C a +40°C*

*Humedad — funcionamiento, almacenamiento y transporte: < 95% sin condensación*

Directora Técnica: Nancy Denise Oliva Bioq. Mat.Nº: 8236.

**VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**

Producto autorizado por ANMAT PM-1170- 24

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Este manual suministra las instrucciones para que el profesional instale y opere el Aspirador. Se le proporciona por su propia seguridad y para evitar dañar el Aspirador. Si no entiende este manual, NO USE el Aspirador y póngase en contacto con el proveedor del equipo.

**⚠ El Aspirador no es apto para usarse en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso.**

**⚠ PELIGRO: Para reducir el riesgo de electrocución:**

*Siempre desenchufe el Aspirador de la Red de Alimentación inmediatamente después de usarlo.*

*NO utilice este producto durante el baño.*

*NO coloque ni guarde el producto donde pueda caerse en una tina o lavabo.*

*NO lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido.*

*NO trate de recoger un aspirador que se cayó en el agua.*

⇒ *Desenchúfelo de inmediato.*

⇒ *NO trate de reparar el aspirador. Esto podría provocar una descarga eléctrica.*

*NUNCA lo use cerca de ningún tipo de llama o de sustancias inflamables o explosivas.*

*NUNCA permita que el aspirador exceda las especificaciones de temperatura de funcionamiento o almacenamiento.*

*Se debe tener precaución al usar el aspirador donde se esté administrando oxígeno.*

RESPIFLOW  
APODERADO

Dra. NANCY DENISSE OLIVA  
M. Nº 8236  
BIOQUÍMICA

F



**⚠️ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución o lesión a las personas:**

0387

*El Aspirador no debe dejarse funcionando sin supervisión.*

*Se necesita una cuidadosa supervisión cuando el producto sea utilizado por niños o inválidos, o se utilice en ellos o cerca de ellos.*

*Use el Aspirador sólo para su "uso previsto" según se describe en este manual.*

*NO utilice accesorios no recomendados por Precision Medical, Inc.*

*NO debe ser usado por personas adormecidas o somnolientas.*

*NO debe usarse si el cable o el enchufe del Aspirador está dañado.*

*NO debe usarse si el Aspirador se ha caído o dañado.*

*NO cubra los respiraderos. La restricción del flujo de aire hará que el aspirador se recaliente, y provocará que el disyuntor automático térmico apague el aspirador.*

*NO deje caer ni inserte ningún objeto en las aberturas u orificios.*

*Conecte este aspirador a un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Vea las instrucciones de "Conexión a tierra".*

*Mantenga el cable alejado de superficies calientes.*

**⚠️ PRECAUCIÓN**

*Si por algún motivo una etiqueta se vuelve ilegible o se cae, comuníquese con Precision Medical, Inc.*

**⚠️ PRECAUCIÓN**

*Examine visualmente el Aspirador para ver si está dañado.*

*NO LO USE si está dañado.*

*Solamente se puede asegurar el funcionamiento de la conexión a tierra si el cable de alimentación eléctrica está conectado a un receptáculo equivalente con la inscripción "Grado Hospital".*

**USO PREVISTO**

Los Aspiradores están diseñados para suministrar una fuente continua de vacío adecuada dentro del rango de vacío de funcionamiento establecido, y aspirar líquidos en procedimientos médicos de succión a cargo de profesionales médicos capacitados.

**RECEPCIÓN/INSPECCIÓN**

Retire el Aspirador de Precision Medical del embalaje y examínelo para ver si está dañado. Si hubiera algún daño, NO LO USE y póngase en contacto con el proveedor del equipo.

RESPIFLOW S.A.  
APODERADO

**Instrucciones para la conexión a tierra**

El Aspirador debe conectarse a tierra. En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este aspirador está equipado con un cable que contiene un cable de conexión a tierra con un enchufe

Dra. NANCY DENISE OLIVA  
M. Nº 8236  
BIQUÍMICA



de conexión a tierra. El enchufe debe enchufarse en un tomacorriente que esté debidamente instalado y conectado a tierra.

**PELIGRO**

Usar un enchufe de conexión a tierra incorrectamente puede conllevar el riesgo de descarga eléctrica.

**ADVERTENCIA**

Solamente se puede asegurar el funcionamiento de la conexión a tierra si el cable de alimentación eléctrica está conectado a un receptáculo equivalente con la inscripción "Grado Hospital".

**INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO**

**PRECAUCIÓN:** Examine visualmente el Aspirador. NO LO USE si está dañado.

**A. Funcionamiento Normal (Todos los modelos)**

1. Coloque el Aspirador sobre una mesa, el piso o cualquier otra superficie horizontal lisa y dura, y cerca de un receptáculo eléctrico debidamente conectado a tierra.  
Deje un espacio de al menos 4 pulgadas (10 cm) alrededor del aparato para asegurar que el aire fluya adecuadamente para enfriar el aspirador.

2. Presione hacia abajo el aspirador hasta que las patas de succión estén firmemente adheridas.
3. Asegúrese de que el botón de encendido/apagado (On/Off) esté en la posición "Off".
4. Verifique que el filtro hidrofóbico en línea esté conectado correctamente al puerto de vacío en la tapa del cilindro de succión.

⇒ • El filtro hidrofóbico en línea evita que el líquido entre en la bomba de vacío.

**PRECAUCIÓN**

NO haga funcionar el Aspirador sin el filtro hidrofóbico en línea. Hacerlo anularía la garantía.

5. Enchufe el aspirador en un receptáculo debidamente conectado a tierra.
6. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "On".
7. Bloquee la conexión hacia el paciente en el cilindro de succión y ajuste la perilla de control de vacío al valor de vacío deseado.

Para AUMENTAR el vacío - Gire la perilla HACIA LA DERECHA

Para DISMINUIR el vacío - Gire la perilla HACIA LA IZQUIERDA

⇒ • El vacío se debe ajustar al valor indicado por el médico o profesional de la salud.

8. Conecte un extremo del tubo de succión para el paciente al puerto del cilindro marcado "Patient Tubing" (tubo del paciente).
9. Conecte el otro extremo del tubo de succión para el paciente a la sonda de succión y comience el procedimiento según las instrucciones del profesional de la salud.
10. Una vez finalizado el procedimiento, oprima el interruptor On/Off a la posición "off".

⇒ • NO llene demasiado el cilindro.

11. Vacíe el cilindro de succión de la siguiente manera:

⇒ • Retire el cilindro de su sujetador y vacíelo según las instrucciones del médico o profesional de la salud.

RESPIFLOW S.A.

APODERADO de la salud.

Dr. NANCY DENISSE OLIVA  
M. N° 8236  
BIOQUIMICA

**PRECAUCIÓN:** Cada cilindro es para usar en un solo paciente.

12. Vuelva a colocar el cilindro de succión y reconecte todos los tubos de succión.



## B. Funcionamiento con batería (Solo modelo EasyGo Vac)

1. Pasos 1 a 4, vea las instrucciones de funcionamiento, en la página anterior

0387

### PRECAUCIÓN

La batería debe estar completamente cargada antes de usar; para cargar la batería vea la sección "Cómo cargar la batería".

Cuando la luz amarilla indicadora de que queda poca batería esté continuamente encendida durante el uso normal, es necesario cargar la batería.

Si la parada automática ocurre durante el funcionamiento con batería, el Aspirador Easy Go Vac no puede volver a encenderse hasta que la batería haya sido recargada, o hasta que el aspirador esté conectado a una de las dos opciones de alimentación eléctrica externa.

5. Oprima el interruptor de encendido/apagado ( / ) a la posición "ON". Si la luz de batería baja amarilla permanece encendida, es necesario cargar la batería. Cargue la batería o use otro modo de funcionamiento.

### ADVERTENCIA

*Si se continúa usando el aspirador Easy Go Vac después de que haya estado encendida la luz amarilla indicadora de batería baja el aparato se apagará automáticamente.*

6. Bloquee la conexión hacia el paciente en el cilindro de succión y ajuste la perilla de control de vacío al valor de vacío deseado.

Para AUMENTAR el vacío - Gire la perilla HACIA LA DERECHA

Para DISMINUIR el vacío - Gire la perilla HACIA LA IZQUIERDA

El vacío se debe ajustar al valor indicado por el médico o profesional de la salud.

7. Conecte un extremo del tubo de succión para el paciente al puerto del cilindro marcado "Patient Tubing" (tubo del paciente).

8. Conecte el otro extremo del tubo de succión para el paciente a la sonda de succión y comience el procedimiento según las instrucciones del profesional de la salud.

9. Una vez finalizado el procedimiento, oprima el interruptor On/Off ( / ) a la posición de "apagado". NO llene demasiado el cilindro.

10. Vacíe el cilindro de succión de la siguiente manera:

Retire el cilindro de su sujetador y vacíelo según las instrucciones del médico o profesional de la salud.

### PRECAUCIÓN

*Cada cilindro es para usar en un solo paciente.*

11. Vuelva a colocar el cilindro de succión y reconecte todos los tubos de succión.

## C. Funcionamiento con CC de automóvil (Solo modelo EasyGo Vac)

1. Pasos 1 a 4, vea las instrucciones de funcionamiento, en la página anterior.

a. Inserte el enchufe pequeño en el cable de CC para el automóvil en el enchufe de alimentación externa ubicado en el aspirador.


Inserte el otro extremo en el receptáculo de alimentación eléctrica del automóvil.

### PRECAUCIÓN

*NO deje el aspirador conectado al receptáculo de alimentación eléctrica del automóvil cuando no se esté usando. No seguir estas instrucciones podría causar serias fallas en la batería y anularía la garantía, vea las instrucciones sobre Cómo cargar la batería .*

Dr. NANCY DENISSE OLIVA  
BIOQUÍMICA



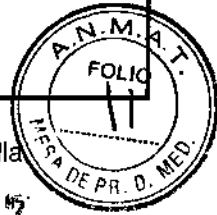

5. Oprima el interruptor de encendido/apagado ( / ) a la posición de "encendido". Si la luz amarilla indicadora de batería baja permanece encendida, es necesario cargar la batería. **0387**  
Cargue la batería o use otro modo de funcionamiento.

#### ADVERTENCIA

*Si se continúa usando el aspirador Easy Go Vac después de que haya estado encendida la luz amarilla indicadora de batería baja el aparato se apagará automáticamente.*

6. Bloquee la conexión hacia el paciente en el cilindro de succión y ajuste la perilla de control de vacío al valor de vacío deseado.

Para AUMENTAR el vacío - Gire la perilla HACIA LA DERECHA

Para DISMINUIR el vacío - Gire la perilla HACIA LA IZQUIERDA

El vacío se debe ajustar al valor indicado por el médico o profesional de la salud.

7. Conecte un extremo del tubo de succión para el paciente al puerto del cilindro marcado "Patient Tubing" (tubo del paciente).

8. Conecte el otro extremo del tubo de succión para el paciente a la sonda de succión y comience el procedimiento según las instrucciones del profesional de la salud.

9. Una vez finalizado el procedimiento, oprima el interruptor On/Off ( / ) a la posición de "apagado". NO llene demasiado el cilindro.

10. Vacíe el cilindro de succión de la siguiente manera:

Retire el cilindro de su sujetador y vacíelo según las instrucciones del médico o profesional de la salud.

#### PRECAUCIÓN

*Cada cilindro es para usar en un solo paciente.*

11. Vuelva a colocar el cilindro de succión y reconecte todos los tubos de succión.

Cómo cargar la batería

1. Inserte el enchufe pequeño del cable del cargador de la batería/ fuente de alimentación en el enchufe de alimentación externa ubicado en el Aspirador Easy Go Vac.

2. Conecte el extremo hembra del cable de alimentación de CA en el cargador de la batería/fuente de alimentación eléctrica.

3. Enchufe el extremo macho (enchufe de 3 clavijas) en un tomacorrientes conectado a tierra. Se encenderá la luz de encendido verde. También se encenderá la luz de carga color ámbar. Cuando se apague la luz ámbar, la batería estará totalmente cargada. Tarda, en promedio, de 2 a 4 horas en cargar.

(Las baterías nuevas pueden tardar más en cargar la primera vez.)

*Nota: No ocurrirá ningún daño si el cargador se deja conectado.*

4. Desconecte el cable de alimentación de CA del tomacorriente.

5. Desconecte el cable del enchufe de alimentación externa en el aspirador. Cuando esté completamente cargada, la batería proporcionará aproximadamente 120 minutos de funcionamiento en periodos de duración intermitente de 8, 15 minutos.

RESPIFLOW S.A.  
APODERADO

**Limpieza/Mantenimiento**

#### ADVERTENCIA

⇒ Apague el Aspirador y desconéctelo de la fuente de alimentación externa antes de limpiarlo.

Drx. NANCY DENISSE OLIVA  
M. Nº 8286  
RIOQUIMICA

**Filtro hidrofóbico en línea:**

Este filtro no puede limpiarse. Si se contamina o tapa, debe reemplazarse.

0387

**Para reemplazar el filtro hidrofóbico en línea:**

1. Desconecte el conjunto del filtro del cilindro de succión y retire este último del aspirador.
2. Retire el conjunto completo del filtro del aspirador.
3. Deseche el filtro.
4. Instale un filtro nuevo y vuelva a conectar los tubos y el codo.

*El tubo es para usar en un solo paciente. NO LO limpie.*

**Limpeza de los componentes externos:**

Use un trapo o una esponja con agua y jabón.

Seque con un trapo limpio o una servilleta de papel.

**Solución de problemas**

Si el Aspirador no funciona, consulte la Guía de Resolución de Problemas. Si el problema no se puede corregir, consulte al proveedor del equipo.

Problema	Causa probable	Solución
El aspirador no funciona	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El interruptor de encendido/apagado está en la posición "OFF"</li> <li>2. El cable eléctrico no está debidamente conectado</li> <li>3. Se ha excedido el límite térmico</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "ON"</li> <li>2. Examine el enchufe en el tomacorriente</li> <li>3. Apague el aspirador, espere 15 minutos, asegúrese de que los respiraderos no estén tapados</li> </ol>
El medidor no registra vacío y no hay vacío en el tubo de conexión para el paciente	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El filtro hidrofóbico no está conectado correctamente</li> <li>2. El cilindro de succión no está conectado o ensamblado correctamente</li> <li>3. Cilindro de succión defectuoso</li> <li>4. Regulador defectuoso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique y apriete las conexiones</li> <li>2. Verifique y apriete</li> <li>3. Cambie el cilindro de succión</li> <li>4. Llame al proveedor del equipo</li> </ol>
El medidor no registra vacío pero hay vacío en el tubo de conexión para el paciente	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medidor de vacío defectuoso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llame al proveedor del equipo</li> </ol>
El medidor registra vacío pero no hay vacío en el tubo de conexión para el paciente	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filtro hidrofóbico tapado</li> <li>2. Cilindro demasiado lleno</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambie el filtro hidrofóbico</li> <li>2. Vacíe el cilindro</li> </ol>
No se puede ajustar el vacío	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulador defectuoso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llame al proveedor del equipo</li> </ol>

RESPIFLOW S.A.  
APODERADO

Dra. NANCY DENISSE OLIVA  
M. N° 8236  
BIOQUIMICA

## ESPECIFICACIONES

038/4

Problema	Causa probable	Solución
El Aspirador Easy Go Vac no funciona a batería	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El interruptor de encendido/apagado (⊙/⊙) está en la posición de "apagado"</li> <li>2. La batería no está cargada (La luz de batería baja está encendida)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mueva al interruptor de encendido/apagado (⊙/⊙) a la posición "Encendido"</li> <li>2. Recargue la batería</li> <li>3. Si la batería no carga, llame al proveedor del equipo</li> </ol>
El Aspirador Easy Go Vac no funciona cuando se conecta a una fuente de alimentación de CA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El interruptor de encendido/apagado (⊙/⊙) está en la posición de "apagado"</li> <li>2. El cable de alimentación no está conectado</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mueva el interruptor de encendido/apagado (⊙/⊙) a la posición "Encendido"</li> <li>2. Revise la conexión de la fuente de alimentación CA y del aspirador</li> </ol>
El Aspirador Easy Go Vac no funciona cuando se conecta al cable de CC de automóvil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El interruptor de encendido/apagado (⊙/⊙) está en la posición de "apagado"</li> <li>2. El cable para usar en el automóvil no está bien conectado</li> <li>3. El receptáculo de alimentación eléctrica del automóvil está defectuoso</li> <li>4. El cable para usar en el automóvil está defectuoso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El interruptor de encendido/apagado (⊙/⊙) está en la posición de "encendido"</li> <li>2. Revise las conexiones en ambos extremos del cable</li> <li>3. Conéctelo a un receptáculo de alimentación eléctrica de automóvil que sepa que funciona</li> <li>4. Llame al proveedor del equipo</li> </ol>

## Instrucciones para desechar

RESPIFLOW es un producto biológico tal como se describe en el protocolo del profesional de la salud o la institución sanitaria.

## ADVERTENCIA

Si el aspirador se usa en el tratamiento de una enfermedad infecciosa, consulte los procedimientos y/o la legislación local aplicable o recomendada para eliminarlo debidamente



## Easy Go Vac PM65

0387

**Dimensiones (en la bolsa para llevar):**

Longitud: 12 pulg. (30 cm)

Ancho: 9.5 pulg. (24 cm)

Altura: 10 pulg. (25 cm)

**Peso (con bolsa para llevar y todos los accesorios):** 9.6 lbs. (4.4 kg)**Peso con embalaje:** 11 lbs. (5 kg)**Cilindro de succión** 800 cc de volumen máximo

El vacío no debe exceder 25 pulg. Hg (84.7 kPa).

La tapa del cilindro tiene una válvula de apagado con flotador que evita que el aspirador se llene demasiado.

**Tubo para el paciente:** tubo de PVC no conductor de 1/4 pulg. de DI, 6 pies de longitud, con conectores hembra de 1/4 pulg. a 3/8 pulg. de DI, o equivalentes**Electricidad:**

Aspirador: 12 voltios CC, 1.8 amperios

Cargador de la batería/Fuente de alimentación eléctrica:

100 - 240 voltios CA, 50/60 Hz,

0.80-0.35 amperios

Tipo de batería interna: 12 voltios, batería de ácido-plomo hermética

**Vacío:** 2 - 21 pulg. Hg (51 - 533 mm Hg)**Flujo:** 6.5 ± 0.4 lpm a 11.8 pulg. Hg

(300 mm Hg)

**Rango de temperatura de funcionamiento:** 50 °F a 104 °F (10 °C a 40 °C)**Condiciones de almacenamiento y transporte:**

Rango de temperatura de almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)

Humedad máxima: 95% sin condensación

**Clasificación del equipo:**

Clase I - con respecto a la protección contra descarga eléctrica

Tipo BF - grado de protección contra descarga eléctrica

IPX0 - grado de protección contra ingreso de líquidos

Modo de funcionamiento - continuo

**Piezas de Repuesto****EasyGo Vac PM-65**

Descripción	Pieza N.º
Filtro	502438
Conjunto del filtro	503293
Cilindro de 800 cc (caja de 10 u.)	502519-10
Tubo de succión para el paciente	1955
Cargador grado doméstico	502452
Cargador grado hospital	503544
Bolsa para llevar	502956
Cable de alimentación CA (65)	503106
Cable de CC para automóvil	502954

RESPIFLOW S.A.  
APODERADO

 Dra. NANCY DENISSE OLIVA  
M. Nº 8236  
BIOQUIMICA