



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-372-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 14 de Enero de 2019

Referencia: 1-47-3110-1831-18-3

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-1831-18-3 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones IPMAG S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Bioimpianti, nombre descriptivo Sistema de reemplazo de articulación de cadera e instrumental asociado y nombre técnico PROTESIS, DE ARTICULACION, PARA CADERA, de acuerdo con lo solicitado por IPMAG S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2018-55862564-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-1029-76”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Sistema de reemplazo de articulación de cadera e instrumental asociado.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-166 PROTESIS, DE ARTICULACION, PARA CADERA

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Bioimpianti.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: indicado en patologías de cadera que requieren una artroplastia para reducir o eliminar el dolor y/o mejorar la función. Las pautas generales son:

- Trastornos degenerativos no inflamatorios como la artrosis de la carga conjunta en primaria o secundaria.
- La necrosis aséptica de la cabeza femoral.
- Artritis reumatoidea.
- Artritis postraumática.
- Corrección de la deformidad funcional.

- Resultados de las fracturas del cuello femoral.
- Resultado de las luxaciones traumáticas de cadera.
- Los fallos de osteotomía.
- Resultados de las artrodesis.

Modelos:

Cotilo FIN DMD Multihole REV

- 110353046 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 46mm
- 110353048 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 48mm
- 110353050 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 50mm
- 110353052 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 52mm
- 110353054 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 54mm
- 110353056 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 56mm
- 110353058 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 58mm
- 110353060 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 60mm
- 110353062 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 62mm
- 110353064 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 64mm
- 110353066 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 66mm
- 110353068 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 68mm
- 110353070 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 70mm
- 110353072 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 72mm

Cotilo FIN DMD Ninehole

- 110354048 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 48mm
- 110354050 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 50mm
- 110354052 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 52mm
- 110354054 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 54mm
- 110354056 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 56mm
- 110354058 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 58mm
- 110354060 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 60mm
- 110354062 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 62mm

110354064 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 64mm

110354066 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 66mm

110354068 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 68mm

110354070 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 70mm

110354072 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 72mm

Cotilo FIN DMD

110355046 Cotilo FIN DMD diám. 46mm

110355048 Cotilo FIN DMD diám. 48mm

110355050 Cotilo FIN DMD diám. 50mm

110355052 Cotilo FIN DMD diám. 52mm

110355054 Cotilo FIN DMD diám. 54mm

110355056 Cotilo FIN DMD diám. 56mm

110355058 Cotilo FIN DMD diám. 58mm

110355060 Cotilo FIN DMD diám. 60mm

110355062 Cotilo FIN DMD diám. 62mm

110355064 Cotilo FIN DMD diám. 64mm

110355066 Cotilo FIN DMD diám. 66mm

110355068 Cotilo FIN DMD diám. 68mm

110355070 Cotilo FIN DMD diám. 70mm

110355072 Cotilo FIN DMD diám. 72mm

AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR

110356144 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 44/46 Gr.15mm

110356244 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 44/46 Gr.20mm

110356344 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 44/46 Gr.25mm

110356148 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 48/50 Gr.15mm

110356248 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 48/50 Gr.20mm

110356348 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 48/50 Gr.25mm

110356152 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 52/54 Gr.15mm

110356252 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 52/54 Gr.20mm
110356352 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 52/54 Gr.25mm
110356156 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 56/58 Gr.15mm
110356256 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 56/58 Gr.20mm
110356356 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 56/58 Gr.25mm
110356160 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 60/62 Gr.15mm
110356260 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 60/62 Gr.20mm
110356360 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 60/62 Gr.25mm
110356164 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 64/66 Gr.15mm
110356264 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 64/66 Gr.20mm
110356364 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 64/66 Gr.25mm
110356168 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 68/70 Gr.15mm
110356268 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 68/70 Gr.20mm
110356368 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 68/70 Gr.25mm
TORNILLO DISTAL EVO-NAIL HEX.3,5MM
140401232 TORNILLO DISTAL EVO-NAIL HEX. 3,5MM L.32,5
140401237 TORNILLO DISTAL EVO-NAIL HEX. 3,5MM L.37,5
140401242 TORNILLO DISTAL EVO-NAIL HEX. 3,5MM L.42,5
140401247 TORNILLO DISTAL EVO-NAIL HEX. 3,5MM L.47,5
SET DE INSTRUMENTAL FIN DMD WEDGE
110383300 BANDEJA Y TAPA FIN DMD WEDGE
110383280 PINZA PARA SUJETAR AUMENTO EN CUÑA
110383285 POSICIONADOR DE AUMENTO EN CUÑA
110383290 DESTORNILLADOR FLEXIBLE FIN DMD
110383044 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 44/46 GR. 15mm
110383144 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 44/46 GR. 20mm
110383244 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 44/46 GR. 25mm
110383048 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 48/50 GR. 15mm
110383148 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 48/50 GR. 20mm

110383248 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 48/50 GR. 25mm
110383052 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 52/54 GR. 15mm
110383152 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 52/54 GR. 20mm
110383252 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 52/54 GR. 25mm
110383056 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 56/58 GR. 15mm
110383156 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 56/58 GR. 20mm
110383256 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 56/58 GR. 25mm
110383060 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 60/62 GR. 15mm
110383160 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 60/62 GR. 20mm
110383260 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 60/62 GR. 25mm
110383064 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 64/66 GR. 15mm
110383164 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 64/66 GR. 20mm
110383264 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 64/66 GR. 25mm
110383068 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 68/70 GR. 15mm
110383168 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 68/70 GR. 20mm
110383268 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 68/70 GR. 25mm

CABEZAS FEMORALES

110205105E CABEZA REX 28MM 12/14 CUELLO CORTO
110205110E CABEZA REX 28MM 12/14 CUELLO MEDIANO
110205115E CABEZA REX 28MM 12/14 CUELLO LARGO
110205120E CABEZA REX 28MM 12/14 CUELLO EXTRA LARGO
110205125E CABEZA REX 28MM 12/14 CUELLO XXL
110205205E CABEZA REX 32MM 12/14 CUELLO CORTO
110205210E CABEZA REX 32MM 12/14 CUELLO MEDIANO
110205215E CABEZA REX 32MM 12/14 CUELLO LARGO
110205220E CABEZA REX 32MM 12/14 CUELLO EXTRA LARGO
110205225E CABEZA REX 32MM 12/14 CUELLO XXL
110210105E CABEZA COCR 28MM 12/14 CUELLO CORTO

110210110E CABEZA COCR 28MM 12/14 CUELLO MEDIANO
110210115E CABEZA COCR 28MM 12/14 CUELLO LARGO
110210120E CABEZA COCR 28MM 12/14 CUELLO EXTRA LARGO
110210125E CABEZA COCR 28MM 12/14 CUELLO XXL
110220105E CABEZA COCR 32MM 12/14 CUELLO CORTO
110220110E CABEZA COCR 32MM 12/14 CUELLO MEDIANO
110220115E CABEZA COCR 32MM 12/14 CUELLO LARGO
110220120E CABEZA COCR 32MM 12/14 CUELLO EXTRA LARGO
110220125E CABEZA COCR 32MM 12/14 CUELLO XXL
110367705 CABEZA COCR 36MM 12/14 CUELLO CORTO
110367710 CABEZA COCR 36MM 12/14 CUELLO MEDIANO
110367715 CABEZA COCR 36MM 12/14 CUELLO LARGO
110367720 CABEZA COCR 36MM 12/14 CUELLO EXTRA LARGO
110240205 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 28MM 12/14 CUELLO CORTO
110240210 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 28MM 12/14 CUELLO MEDIANO
110240215 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 28MM 12/14 CUELLO LARGO
110240305 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 32MM 12/14 CUELLO CORTO
110240310 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 32MM 12/14 CUELLO MEDIANO
110240315 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 32MM 12/14 CUELLO LARGO
110240320 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 32MM 12/14 CUELLO EXTRA LARGO
110240405 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 36MM 12/14 CUELLO CORTO
110240410 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 36MM 12/14 CUELLO MEDIANO
110240415 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 36MM 12/14 CUELLO LARGO
110240420 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 36MM 12/14 CUELLO EXTRA LARGO
110240505 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 40MM 12/14 CUELLO CORTO
110240510 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 40MM 12/14 CUELLO MEDIANO
110240515 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 40MM 12/14 CUELLO LARGO
110240520 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 40MM 12/14 CUELLO EXTRA LARGO
110241105E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO CORTO 12/14 28MM

110241110E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO MEDIANO 12/14 28MM
110241115E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO LARGO 12/14 28MM
110241120E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO EXTRA LARGO 12/14 28MM
110242105E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO CORTO 12/14 32MM
110242110E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO MEDIANO 12/14 32MM
110242115E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO LARGO 12/14 32MM
110242120E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO EXTRA LARGO 12/14 32MM

CABEZAS CEFÁLICAS

110800040C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.40MM S.N.
110800040M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.40MM M.N.
110800040L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.40MM L.N.
110800042C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.42MM S.N.
110800042M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.42MM M.N.
110800042L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.42MM L.N.
110800044C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.44MM S.N.
110800044M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.44MM M.N.
110800044L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.44MM L.N.
110800046C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.46MM S.N.
110800046M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.46MM M.N.
110800046L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.46MM L.N.
110800048C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.48MM S.N.
110800048M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.48MM M.N.
110800048L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.48MM L.N.
110800050C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.50MM S.N.
110800050M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.50MM M.N.
110800050L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.50MM L.N.
110800052C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.52MM S.N.

110800052M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.52MM M.N.
110800052L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.52MM L.N.
110800054C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.54MM S.N.
110800054M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.54MM M.N.
110800054L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.54MM L.N.

MRP

110266107 ESPACIADOR CILÍNDRICO "MRP" L. 50 MM
110266100 COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN "MRP" L.75 MM
110266101 COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN "MRP" L.100 MM
110266102 COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN "MRP" L.125 MM
110266103 COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN "MRP" L.150 MM
110266104 COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN "MRP" L.175 MM
110266105 COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN "MRP" L.200 MM
110266022 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 140MM DIÁ. 12MM
110266024 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 160MM DIÁ. 12MM
110266026 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 180MM DIÁ. 12MM
110266030 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 140MM DIÁ. 13MM
110266032 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 160MM DIÁ. 13MM
110266034 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 180MM DIÁ. 13MM
110266038 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 140MM DIÁ. 14MM
110266040 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 160MM DIÁ. 14MM
110266042 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 180MM DIÁ. 14MM
110266044 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 140MM DIÁ. 16MM
110266046 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 160MM DIÁ. 16MM
110266048 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 180MM DIÁ. 16MM
110266110 TORNILLO "MRP" L.75MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN
110266111 TORNILLO "MRP" L.100MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN
110266112 TORNILLO "MRP" L.125MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN

110266113 TORNILLO "MRP" L.150MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN
110266114 TORNILLO "MRP" L.175MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN
110266115 TORNILLO "MRP" L.200MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN
110266116 TORNILLO "MRP" L.225MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN
110266117 TORNILLO "MRP" L.250MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN
110266118 TORNILLO "MRP" L.275MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN
110266119 TORNILLO "MRP" L.300MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN

INSTRUMENTAL MRP

110266100 BANDEJA PARA INSTRUMENTAL

110266200 PRUEBA PARA COMPONENTE PROXIMAL L. 75 MM

110266201 PRUEBA PARA COMPONENTE PROXIMAL L. 100 MM

110266202 PRUEBA PARA COMPONENTE PROXIMAL L. 125 MM

110266203 PRUEBA PARA COMPONENTE PROXIMAL L. 150 MM

110266204 PRUEBA PARA COMPONENTE PROXIMAL L. 175 MM

110266205 PRUEBA PARA COMPONENTE PROXIMAL L. 200 MM

110266207 ESPACIADOR DE PRUEBA L. 50MM

120540412 EJE NO GIRATORIO SMR

110380860 CABEZA DE PRUEBA 28MM S.N.

110380870 CABEZA DE PRUEBA 28MM M.N.

110380880 CABEZA DE PRUEBA 28MM L.N.

110380890 CABEZA DE PRUEBA 28MM XL.N.

110266220 EXTRACTOR PARA COMPONENTE PROXIMAL 75-100-125

110266221 EXTRACTOR PARA COMPONENTE PROXIMAL 150-175-200

110266222 EXTRACTOR PARA COMPONENTE PROXIMAL 225-250

110266225 VARILLA DE MONTAJE

120540405 DESTORNILLADOR

COTILO ACETABULAR CON HA FIN II

110350144H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 44MM
110350146H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 46MM
110350148H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 48MM
110350150H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 50MM
110350152H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 52MM
110350154H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 54MM
110350156H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 56MM
110350158H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 58MM
110350160H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 60MM
110350162H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 62MM
110350164H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 64MM
110350166H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 66MM
110350168H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 68MM
110350170H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 70MM
110350172H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 72MM

COTILO ACETABULAR FIN MB

110352044 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 44MM
110352046 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 46MM
110352048 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 48MM
110352050 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 50MM
110352052 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 52MM
110352054 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 54MM
110352056 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 56MM
110352058 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 58MM
110352060 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 60MM
110352062 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 62MM
110352064 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 64MM
110352066 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 66MM
110352068 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 68MM

110352070 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 70MM

110352072 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 72MM

COTILO ACETABULAR FIN II

110350144 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 44MM

110350146 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 46MM

110350148 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 48MM

110350150 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 50MM

110350152 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 52MM

110350154 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 54MM

110350156 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 56MM

110350158 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 58MM

110350160 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 60MM

110350162 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 62MM

110350164 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 64MM

110350166 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 66MM

110350168 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 68MM

110350170 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 70MM

110350172 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 72MM

110364244 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN 44-46

110364248 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN 48-50

110364252 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN 52-54

110364256 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN 56-58

110364260 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN 60-72

110364344 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN 44-46

110364348 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN 48-50

110364352 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN 52-54

110364356 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN 56-58

110364360 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN 60-72

110361144 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 44/46
110361248 INTERNO 32MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 48/50
110361252 INTERNO 32MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 52/54
110361256 INTERNO 32MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 56/58
110361352 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 52/54
110361356 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 56/58
110361360 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 60/72
110361364 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 64/72
110361460 INTERNO 40MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 60/72
110362144 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 44/46
110362248 INTERNO 32MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 48/50
110362252 INTERNO 32MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 52/54
110362256 INTERNO 32MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 56/58
110362352 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 52/54
110362356 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 56/58
110362360 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 60/72
110362364 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 64/72
110362460 INTERNO 40MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ. 60/72
110363144 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 44/46
110363148 INTERNO 32MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 48/50
110363152 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 52/54
110363156 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 56/58
110363160 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 60/72
110363252 INTERNO 32MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 52/54
110363256 INTERNO 32MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 56/58
110363344 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 44/46
110363348 INTERNO 32MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 48/50
110363352 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 52/54
110363356 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 56/58

110363360 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 60/72
110363452 INTERNO 32MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 52/54
110363456 INTERNO 32MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 56/58
110367848 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 48-50 INTERNO 28MM
110367852 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 52-54 INTERNO 28MM
110367856 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 56-58 INTERNO 28MM
110367044 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 44-46 INTERNO 28MM
110367048 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 48-50 INTERNO 32MM
110367052 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 52-54 INTERNO 32MM
110367056 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 56-58 INTERNO 32MM
110367060 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 60-72 INTERNO 32MM
110367064 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 64-66 INTERNO 32MM
110367152 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 52-54 INTERNO 36MM
110367156 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 56-58 INTERNO 36MM
110367160 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 60-72 INTERNO 36MM
110367164 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 64-72 INTERNO 36MM
110367176 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 56-58 INTERNO 40MM
110367180 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 60-72 INTERNO 40MM
110364600 TAPÓN CON BLOQUEO PARA FIN II
110364601 TAPÓN DE FONDO PARA FIN II
110364620 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 20MM
110364625 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 25MM
110364630 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 30MM
110364635 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 35MM
110364640 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 40MM
110364645 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 45MM
110364650 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 50MM
ANILLO DE REVISIÓN

110351152 ANILLO DE REVISIÓN PARA COTILO FIN II 52-54
110351156 ANILLO DE REVISIÓN PARA COTILO FIN II 56-58
110351160 ANILLO DE REVISIÓN PARA COTILO FIN II 60-72
200840015 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 15MM
200840020 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 20MM
200840025 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 25MM
200840030 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 30MM
200840035 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 35MM
200840040 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 40MM
200840045 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 45MM
200840050 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 50MM
INSTRUMENTAL PARA COTILO ACETABULAR FIN
110380344 ADAPTADOR PARA FIN II 44-50
110380348 ADAPTADOR PARA FIN II 48-50
110380352 ADAPTADOR PARA FIN II 52-58
110380356 ADAPTADOR PARA FIN II 56-58
110380360 ADAPTADOR PARA FIN II 60-72
110380400 ADAPTADOR DE INSERTADOR PARA INSERTO DE POLIETILENO O°
110380420 IMPACTOR PARA FIN II
110380828 EXTRACTOR DE CERÁMICA FIN II
110381601 EXTRACTOR DE INSERTO DE POLIETILENO 44-50
110381602 EXTRACTOR DE INSERTO DE POLIETILENO 52-58
110381603 EXTRACTOR DE INSERTO DE POLIETILENO 60-62
110381640 IMPACTOR PARA COTILO DE PRUEBA
110381641 IMPACTOR PARA INSERTO DE POLIETILENO
110381644 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 44MM
110381646 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 46MM
110381648 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 48MM
110381650 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 50MM

110381652 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 52MM
110381654 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 54MM
110381656 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 56MM
110381658 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 58MM
110381660 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 60MM
110381662 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 62MM
110381664 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 64MM
110381666 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 66MM
110381668 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 68MM
110381670 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 70MM
110381672 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 72MM
110381680 DESTORNILLADOR PARA FIN II
110381681 PINZA PARA TORNILLOS
110381700 BANDEJA SUPERIOR FIN II
110381701 BANDEJA INFERIOR FIN II
110381705 BASE PARA CUBIERTA FIN II
110381706 BANDEJA PARA COTILOS DE PRUEBA FIN II
110381707 BANDEJA PARA IMPACTORES FIN II
110382044 INSERTO DE PRUEBA 44-46 - 0°
110382048 INSERTO DE PRUEBA 48-50 - 0°
110382052 INSERTO DE PRUEBA 52-54 - 0°
110382056 INSERTO DE PRUEBA 56-58 - 0°
110382060 INSERTO DE PRUEBA 60-62 - 0°
110382144 INSERTO DE PRUEBA 44-46 - 5°
110382148 INSERTO DE PRUEBA 48-50 - 5°
110382152 INSERTO DE PRUEBA 52-54 - 5°
110382156 INSERTO DE PRUEBA 56-58 - 5°
110382160 INSERTO DE PRUEBA 60-62 - 5°

110382348 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 48-50
110382352 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 52-54
110382356 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 56-58
110382360 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 60-62
110382364 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 64-72
110382452 INSERTO DE PRUEBA 36MM 0° 52-58
110382460 INSERTO DE PRUEBA 36MM 0° 60-62
110382464 INSERTO DE PRUEBA 36MM 0° 64-72
110382700 INSERTO DE PRUEBA 28MM 0° 44/46MM
110382705 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 48/50MM
110382710 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 52/54MM
110382715 INSERTO DE PRUEBA 36MM 0° 52/54MM
110382720 INSERTO DE PRUEBA 36MM 0° 56/58MM
110382725 INSERTO DE PRUEBA 36MM 0° 60/72MM
110382800 INSERTO DE PRUEBA 28MM 5° 44/46MM
110382805 INSERTO DE PRUEBA 32MM 5° 48/50MM
110382810 INSERTO DE PRUEBA 32MM 5° 52/54MM
110382815 INSERTO DE PRUEBA FIN 36MM 5° 52-54MM
110382820 INSERTO DE PRUEBA 36MM 5° 56/58MM
110382825 INSERTO DE PRUEBA 36MM 5° 60/72MM
110380860 CABEZA DE PRUEBA 28MM S.N.
110380870 CABEZA DE PRUEBA 28MM M.N.
110380880 CABEZA DE PRUEBA 28MM L.N.
110380890 CABEZA DE PRUEBA 28MM XL.N.
110380960 CABEZA DE PRUEBA 32MM S.N.
110380970 CABEZA DE PRUEBA 32MM M.N.
110380980 CABEZA DE PRUEBA 32MM L.N.
110380990 CABEZA DE PRUEBA 32MM XL.N.
110381060 CABEZA DE PRUEBA 36MM S.N.

110381070 CABEZA DE PRUEBA 36MM M.N.
110381080 CABEZA DE PRUEBA 36MM L.N.
110381090 CABEZA DE PRUEBA 36MM XL.N.
110384044 FRESA ACETABULAR 44MM
110384046 FRESA ACETABULAR 46MM
110384048 FRESA ACETABULAR 48MM
110384050 FRESA ACETABULAR 50MM
110384052 FRESA ACETABULAR 52MM
110384054 FRESA ACETABULAR 54MM
110384056 FRESA ACETABULAR 56MM
110384058 FRESA ACETABULAR 58MM
110384060 FRESA ACETABULAR 60MM
110384062 FRESA ACETABULAR 62MM
110384113 MANGO PARA FRESAS "ZIMMER" 12'
110380418 SOPORTE PARA VENTOSA
110380419 VENTOSA PARA INSERTO
110381525 ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA FRESAS CÓNICAS
110388630 IMPACTADOR PARA POLIETILENO INTERNO CON CABEZA 28MM
110388636 CABEZA 32MM PARA IMPACTADOR PARA POLIETILENO
110388637 CABEZA 36MM PARA IMPACTADOR PARA POLIETILENO
110388700 CENTRADOR 3,2MM
110388701 CENTRADOR
110388730 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD
110388760 VARILLA FLEXIBLE CON CONECTOR "JACOBS"
110388771 BROCA DIÁ. 3,2MM L. 70MM
110388772 BROCA DIÁ. 3,2MM L. 56MM
110388773 Broca DIÁ. 4,5mm L. 56
110388800 PINZA PARA TORNILLOS

170010112 DESTORNILLADOR

340085045 DESTORNILLADOR HEXAGONAL PARA TORNILLO 4,5-6,5MM

200760550 PINZA PARA TORNILLOS CANULADOS

PRÓTESIS DE VÁSTAGO FIN

110380508 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO 8.0 CONO 12/14

110380509 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO 9.0 CONO 12/14

110380510 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO 10.0 CONO 12/14

110380511 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO 11.0 CONO 12/14

110380512 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO 12.0 CONO 12/14

110380513 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO 13.0 CONO 12/14

110380514 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO 14.0 CONO 12/14

110380515 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO 15.0 CONO 12/14

110380528 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 8.0 CONO 12/14

110380529 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 9.0 CONO 12/14

110380530 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 10.0 CONO 12/14

110380531 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 11.0 CONO 12/14

110380532 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 12.0 CONO 12/14

110380533 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 13.0 CONO 12/14

110380534 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 14.0 CONO 12/14

110380535 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 15.0 CONO 12/14

110380536 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 16.0 CONO 12/14

VÁSTAGO CORTO FIN

110382608 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 8.0 CONO 12/14

110382609 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 9.0 CONO 12/14

110382610 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 10.0 CONO 12/14

110382611 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 11.0 CONO 12/14

110382612 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 12.0 CONO 12/14

110382613 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 13.0 CONO 12/14

110382614 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 14.0 CONO 12/14

110382615 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 15.0 CONO 12/14

110382508 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 8

110382509 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 9

110382510 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 10

110382511 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 11

110382512 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 12

110382513 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 13

110382514 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 14

110382515 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 15

INSTRUMENTAL PARA VÁSTAGOS FIN

110201253 MANGO PARA RASPA

110380608 RASPA DE VÁSTAGO FIN 8MM

110380609 RASPA DE VÁSTAGO FIN 9MM

110380610 RASPA DE VÁSTAGO FIN 10MM

110380611 RASPA DE VÁSTAGO FIN 11MM

110380612 RASPA DE VÁSTAGO FIN 12MM

110380613 RASPA DE VÁSTAGO FIN 13MM

110380614 RASPA DE VÁSTAGO FIN 14MM

110380615 RASPA DE VÁSTAGO FIN 15MM

110380704N BANDEJA PARA RASPAS E INSTRUMENTAL

110380705N BANDEJA PARA FRESAS E INSTRUMENTAL

110380800 IMPACTOR DE CABEZA

110380805 ADAPTADOR DE IMPACTOR DE CABEZA 28MM

110380810 ADAPTADOR DE IMPACTOR DE CABEZA 32MM

110380812 ADAPTADOR DE IMPACTOR DE CABEZA 36MM

110380820 IMPACTOR – EXTRACTOR DE VÁSTAGO

110380825 EXTRACTOR DE CABEZA

110380826 EXTRACTOR DE VÁSTAGO

110380830 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 28MM S.N
110380840 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 28MM M.N
110380850 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 28MM L.N
110380855 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 28MM XL.N
110380860 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM S.N
110380870 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM M.N
110380880 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM L.N
110380890 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM XL.N
110380930 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 32MM C.C.
110380940 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 32MM C.M.
110380950 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 32MM C.L.
110380960 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM S.N
110380970 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM M.N
110380980 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM L.N
110380990 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM XL.N
110381060 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM S.N
110381070 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM M.N
110381080 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM L.N
110381090 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM XL.N
110381010 OSTEÓTOMO PARA VÁSTAGO FIN
110381408 FRESA CÓNICA FIN 8,0MM-PCL 7,5MM ZIMMER
110381409 FRESA CÓNICA FIN 9,0MM-PCL 9,0MM ZIMMER
110381410 FRESA CÓNICA FIN 10,0MM-PCL 10,5MM ZIMMER
110381411 FRESA CÓNICA FIN 11,0MM-PCL 11,5MM-12,5MM ZIMMER
110381412 FRESA CÓNICA FIN 12,0MM-PCL 14,0MM ZIMMER
110381413 FRESA CÓNICA FIN 13,0MM-PCL 15,5MM ZIMMER
110381521 MANGO EN T PARA FRESA CÓNICA
110381520 MANDRIL RÁPIDO EN T PARA FRESA RECTA
110381525 MANDRIL JACOBS PARA FRESA RECTA

110381560 FRESA PARA CALCAR

110384042 FRESA ACETABULAR DIÁ. 42MM

110384044 FRESA ACETABULAR DIÁ. 44MM

110384046 FRESA ACETABULAR DIÁ. 46MM

110384048 FRESA ACETABULAR DIÁ. 48MM

110384050 Fresa acetabular DIÁ. 50mm

110384052 Fresa acetabular DIÁ. 52mm

110384054 Fresa acetabular DIÁ. 54mm

110384056 FRESA ACETABULAR DIÁ. 56MM

110384058 FRESA ACETABULAR DIÁ. 58MM

110384060 FRESA ACETABULAR DIÁ. 60MM

110384062 FRESA ACETABULAR DIÁ. 62MM

110384064 FRESA ACETABULAR DIÁ. 64MM

110384100 EJE UNIVERSAL AO PARA FRESA ACETABULAR

110384101 EJE UNIVERSAL AESC PARA FRESA ACETABULAR

110384102 EJE UNIVERSAL JACOBS PARA FRESA ACETABULAR

110384103 EJE UNIVERSAL ZIMMER PARA FRESA ACETABULAR

110384104 EJE UNIVERSAL HUDSON PARA FRESA ACETABULAR

110384105 EJE UNIVERSAL ZIMMER PARA FRESA AC. 9"

110384106 EJE UNIVERSAL "AO" PARA FRESA AC. 9"

110384107 EJE UNIVERSAL HURRIS PARA FRESA ACETABULAR

110384113 EJE UNIVERSAL ZIMMER PARA FRESA ACETABULAR 12"

110384116 EJE UNIVERSAL "AO" PARA FRESA ACETABULAR 12"

110384120 BANDEJA PARA FRESA

INSTRUMENTAL PARA VÁSTAGO CORTO FIN

110380820 IMPACTOR-EXTRACTOR DE VÁSTAGO

110381408 FRESA CÓNICA 8MM ZIMMER

110381409 FRESA CÓNICA 9MM ZIMMER

110381410 FRESA CÓNICA 10MM ZIMMER

110381411 FRESA CÓNICA 11MM ZIMMER
110381412 FRESA CÓNICA 12MM ZIMMER
110381413 FRESA CÓNICA 13MM ZIMMER
110380640 IMPACTOR PARA VÁSTAGO CORTO FIN
110380860 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM S.N. FIN-PCL
110380870 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM M.N. FIN-PCL
110380880 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM L.N. FIN-PCL
110380890 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM XL.N. FIN-PCL
110380960 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM S.N. FIN-PCL
110380970 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM M.N. FIN-PCL
110380980 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM L.N. FIN-PCL
110380990 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM XL.N. FIN-PCL
110381060 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM S.N. FIN-PCL
110381070 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM M.N. FIN-PCL
110381080 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM L.N. FIN-PCL
110381090 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM XL.N. FIN-PCL
110381011 OSTEÓTOMO PARA VÁSTAGO PEQUEÑO
110380800 IMPACTOR DE CABEZAS
110380805 ADAPTADOR PARA IMPACTOR DE CABEZAS 28MM
110380810 ADAPTADOR PARA IMPACTOR DE CABEZAS 32MM
110380812 ADAPTADOR PARA IMPACTOR DE CABEZAS 36MM
110381521 MANGO EN T ZIMMER
110381525 ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA FRESAS CÓNICAS
110381560 FRESAS PARA CALCAR
110201253 MANGO PARA RASPA
110201255 ADAPTADOR DE MANGO DEL ESCARIADOR DE VÁSTAGO FIN
110201250 MANGO PARA RASPA
110380628 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 8MM
110380629 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 9MM

110380630 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 10MM
110380631 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 11MM
110380632 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 12MM
110380633 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 13MM
110380634 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 14MM
110380620 ADAPTADOR PARA FIN
110380704N BANDEJA PARA RASPA E INSTRUMENTAL
110380705N BANDEJA PARA FRESA E INSTRUMENTAL
VÁSTAGO MODULAR PARA REVISIÓN DE CADERA - SMR
120362540 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 125° L. 40MM
120362550 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 125° L. 50MM
120362560 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 125° L. 60MM
120362570 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 125° L. 70MM
120363540 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 135° L. 40MM
120363550 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 135° L. 50MM
120363560 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 135° L. 60MM
120363570 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 135° L. 70MM
120372540 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 125° L. 40MM
120372550 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 125° L. 50MM
120372560 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 125° L. 60MM
120372570 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 125° L. 70MM
120373540 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 135° L. 40MM
120373550 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 135° L. 50MM
120373560 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 135° L. 60MM
120373570 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 135° L. 70MM
120373914 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 14MM
120373915 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 15MM
120373916 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 16MM

120373917 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 17MM
120373918 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 18MM
120373919 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 19MM
120373920 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 20MM
120373921 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 21MM
120373922 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 22MM
120373924 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 24MM
120374014 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 14MM
120374015 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 15MM
120374016 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 16MM
120374017 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 17MM
120374018 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 18MM
120374019 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 19MM
120374020 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 20MM
120374021 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 21MM
120374022 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 22MM
120374024 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 24MM
120375014 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 14MM
120375015 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 15MM
120375016 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 16MM
120375017 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 17MM
120375018 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 18MM
120375019 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 19MM
120375020 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 20MM
120375021 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 21MM
120375022 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 22MM
120375024 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 24MM
120376014 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 14MM
120376015 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 15MM

120376016 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 16MM
120376017 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 17MM
120376018 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 18MM
120376019 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 19MM
120376020 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 20MM
120376021 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 21MM
120376022 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 22MM
120376024 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 24MM
120376140 TORNILLO DE BLOQUEO "SMR" TAMAÑO 40
120376150 TORNILLO DE BLOQUEO "SMR" TAMAÑO 50
120376160 TORNILLO DE BLOQUEO "SMR" TAMAÑO 60
120376170 TORNILLO DE BLOQUEO "SMR" TAMAÑO 70

INSTRUMENTAL PARA SMR

120540040 TORNILLO DE BLOQUEO PARA COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA L. 40MM
120540050 TORNILLO DE BLOQUEO PARA COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA L. 50MM
120540060 TORNILLO DE BLOQUEO PARA COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA L. 60MM
120540070 TORNILLO DE BLOQUEO PARA COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA L. 70MM
120540140 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 125° L. 40MM
120540150 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 125° L. 50MM
120540160 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 125° L. 60MM
120540170 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 125° L. 70MM
120540240 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 135° L. 40MM
120540250 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 135° L. 50MM
120540260 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 135° L. 60MM
120540270 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 135° L. 70MM
110380860 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM S.N.
110380870 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM M.N.
110380880 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM L.N.

110380890 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM XL.N.
110380960 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM S.N. FIN-PCL
110380970 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM M.N. FIN-PCL
110380980 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM L.N. FIN-PCL
110380990 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM XL.N. FIN-PCL
110381060 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM S.N. FIN-PCL
110381070 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM M.N. FIN-PCL
110381080 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM L.N. FIN-PCL
110381090 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM XL.N. FIN-PCL
110381525 ACOPLÉ RÁPIDO PARA FRESAS CÓNICAS
110381521 MANGO EN T ZIMMER
120540514 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 14MM
120540515 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 15MM
120540516 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 16MM
120540517 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 17MM
120540518 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 18MM
120540519 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 19MM
120540520 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 20MM
120540521 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 21MM
120540522 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 22MM
120540524 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 24MM
120540714 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 14MM L.100
120540715 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 15MM L.100
120540716 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 16MM L.100
120540717 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 17MM L.100
120540718 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 18MM L.100
120540719 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 19MM L.100
120540720 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 20MM L.100
120540721 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 21MM L.100

120540722 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 22MM L.100

120540724 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 24MM L.100

120540395 GUÍA PARA COMPONENTE PROXIMAL

120540400	FRESA TUBULAR
120540405	DESTORNILLADOR HEXAGONAL
120540409	LLAVE PARA INSERTADOR DE COMPONENTE DISTAL
120540410	INSERTADOR PARA COMPONENTE DISTAL

120540411 IMPACTADOR PARA COMPONENTE PROXIMAL

120540412 EJE NO ROTATORIO

120540415 EJE GUÍA PARA FRESA TUBULAR

120540420 EXTRACTOR PARA COMPONENTE PROXIMAL

110384110 MANGO EN T "AO" PARA FRESA

120540630 ADAPTADOR JACOB PARA FRESAS AO

120540650 BANDEJA DE INSTRUMENTAL SUPERIOR

120540651 BANDEJA DE INSTRUMENTAL INFERIOR

VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS

120410101 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 1

120410102 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 2

120410103 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 3

120410104 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 4

120410105 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 5

120410106 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 6

120410107 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 7

120410108 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 8

120410109 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 9

120410201 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 1

120410202 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 2

120410203 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 3

120410204 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 4

120410205 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 5

120410206 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 6

120410207 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 7

120410208 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 8

120410209 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 9

VÁSTAGO CEMENTADO KORUS

120430001 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 1

120430002 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 2

120430003 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 3

120430004 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 4

120430005 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 5

120430006 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 6

120430007 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 7

120430008 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 8

120430009 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 9

120430011 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 1

120430012 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 2

120430013 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 3

120430014 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 4

120430015 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 5

120430016 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 6

120430017 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 7

120430018 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 8

120430019 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 9

120430021 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL TAMAÑO 1

120430022 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL TAMAÑO 2

120430023 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL TAMAÑO 3

120430024 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL TAMAÑO 4

120430025 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL TAMAÑO 5

120430026 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL TAMAÑO 6

120430027 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL TAMAÑO 7

120430028 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL TAMAÑO 8

120430029 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL TAMAÑO 9

120430031 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 1 CON CENTRADOR DISTAL

120430032 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 2 CON CENTRADOR DISTAL

120430033 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 3 CON CENTRADOR DISTAL

120430034 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 4 CON CENTRADOR DISTAL

120430035 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 5 CON CENTRADOR DISTAL

120430036 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 6 CON CENTRADOR DISTAL

120430037 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 7 CON CENTRADOR DISTAL

120430038 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 8 CON CENTRADOR DISTAL

120430039 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 9 CON CENTRADOR DISTAL

VÁSTAGO MODULAR KORUS

120410602 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 2

120410603 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 3

120410604 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 4

120410605 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 5

120410606 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 6

120410607 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 7

120410608 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 8

120410609 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 9

120420001 CUELLO CORTO ESTÁNDAR TAMAÑO CORTO

120420002 CUELLO LARGO ESTÁNDAR TAMAÑO LARGO

120420011 CUELLO CORTO VARO/VALGO 8° CORTO

120420012 CUELLO LARGO VARO/VALGO 8° LARGO

120420021 CUELLO CORTO VARO/VALGO 15° CORTO

120420022 CUELLO LARGO VARO/VALGO 15° LARGO

120420031 CUELLO CORTO ANTE/RETRO 8° CORTO
120420032 CUELLO LARGO ANTE/RETRO 8° LARGO
120420041 CUELLO CORTO ANTE/RETRO 14° CORTO
120420042 CUELLO LARGO ANTE/RETRO 14° LARGO
120420051 CUELLO CORTO DE CRCO A/R 5° - V/V 6°
120420052 CUELLO LARGO DE CRCO A/R 5° - V/V 6°
120420061 CUELLO CORTO DE CRCO A/R 5° - V/V 6°
120420062 CUELLO LARGO DE CRCO A/R 5° - V/V 6°

INSTRUMENTAL PARA VÁSTAGO KORUS

120410101R RASPA KORUS TAMAÑO 1
120410102R RASPA KORUS TAMAÑO 2
120410103R RASPA KORUS TAMAÑO 3
120410104R RASPA KORUS TAMAÑO 4
120410105R RASPA KORUS TAMAÑO 5
120410106R RASPA KORUS TAMAÑO 6
120410107R RASPA KORUS TAMAÑO 7
120410108R RASPA KORUS TAMAÑO 8
120410109R RASPA KORUS TAMAÑO 9
120411100 MANGO PARA RASPA KORUS
120411105 IMPACTOR PARA VÁSTAGO KORUS
120411104 LLAVE ALLEN 5MM
120380122 IMPACTOR PARA VÁSTAGO
120411106 ADAPTADOR PARA CABEZAS DE PRUEBA 135°
120411107 ADAPTADOR PARA CABEZAS DE PRUEBA 125°
110381010 OSTEÓTOMO
110381011 OSTEÓTOMO PARA VÁSTAGO PEQUEÑO
110381400 FRESA MONOBLOQUE
110380860 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM S.N

110380870 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM M.N
110380880 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM L.N
110380890 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM XL.N
110380960 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM S.N
110380970 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM M.N
110380980 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM L.N
110380990 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM XL.N
110381060 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM S.N
110381070 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM M.N
110381080 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM L.N
110381090 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM XL.N
110380800 IMPACTOR DE CABEZA
110380805 ADAPTADOR DE IMPACTOR DE CABEZA 28MM
110380810 ADAPTADOR DE IMPACTOR DE CABEZA 32MM
110380812 ADAPTADOR DE IMPACTOR DE CABEZA 36MM
110380820 IMPACTOR - EXTRACTOR DE VÁSTAGO
120411130 NUEVA BANDEJA KORUS
120411120 BANDEJA SUPERIOR PARA ESCARIADOR
120411125 RECIPIENTE PARA INSTRUMENTAL
120411101 MANGO PARA RASPA KORUS OFFSET DERECHO
120411102 MANGO PARA RASPA KORUS OFFSET IZQUIERDO
120411103 ACCESORIO DE ACOPLAMIENTO PARA RASPA KORUS
120411108 IMPACTOR PARA VÁSTAGO KORUS
INSTRUMENTAL PARA VÁSTAGO MODULAR KORUS
120421001 CUELLO DE PRUEBA CORTO
120421002 CUELLO DE PRUEBA LARGO
120421011 CUELLO DE PRUEBA CORTO VARO/VALGO 8°
120421012 CUELLO DE PRUEBA LARGO VARO/VALGO 8°
120421021 CUELLO DE PRUEBA CORTO VARO/VALGO 15°

120421022 CUELLO DE PRUEBA LARGO VARO/VALGO 15°

120421031 CUELLO DE PRUEBA CORTO ANTE/RETRO 8°

120421032 CUELLO DE PRUEBA LARGO ANTE/RETRO 8°

120421041 CUELLO DE PRUEBA CORTO ANTE/RETRO 14°

120421042 CUELLO DE PRUEBA LARGO ANTE/RETRO 14°

120421051 CUELLO DE PRUEBA CORTO ANTE 5°/VALGO 6° DERECHO; CUELLO DE PRUEBA CORTO RETRO 5°/VARO 6° DERECHO; CUELLO DE PRUEBA CORTO ANTE 5°/VARO 6° IZQUIERDO; CUELLO DE PRUEBA CORTO RETRO 5°/VALGO 6° IZQUIERDO

120421052 CUELLO DE PRUEBA LARGO ANTE 5°/VALGO 6° DERECHO; CUELLO DE PRUEBA LARGO RETRO 5°/VARO 6° DERECHO; CUELLO DE PRUEBA LARGO ANTE 5°/VARO 6° IZQUIERDO; CUELLO DE PRUEBA LARGO RETRO 5°/VALGO 6° IZQUIERDO

120421061 CUELLO DE PRUEBA CORTO ANTE 5°/VALGO 6° IZQUIERDO; CUELLO DE PRUEBA CORTO RETRO 5°/VARO 6° IZQUIERDO; CUELLO DE PRUEBA CORTO ANTE 5°/VARO 6° DERECHO; CUELLO DE PRUEBA CORTO RETRO 5°/VALGO 6° DERECHO

120421062 CUELLO DE PRUEBA LARGO ANTE 5°/VALGO 6° IZQUIERDO; CUELLO DE PRUEBA LARGO RETRO 5°/VARO 6° IZQUIERDO; CUELLO DE PRUEBA LARGO ANTE 5°/VARO 6° DERECHO; CUELLO DE PRUEBA LARGO RETRO 5°/VALGO 6° DERECHO

120421100 EXTRACTOR DE VÁSTAGO MODULAR KORUS

120421105 IMPACTOR DE VÁSTAGO MODULAR KORUS

120421107 IMPACTOR DE CONO DE CUELLO MODULAR KORUS

120421000 MARCO PARA CUELLOS DE PRUEBA

Período de vida útil:

Sistema: 10 años.

Instrumental: no aplica.

Método de Esterilización:

Componentes metálicos y cerámicos: Radiación Beta o Gamma.

Insertos: ETO

Forma de presentación: Unitaria.

Condición de uso: Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del Fabricante: GRUPPO BIOIMPIANTI S.r.l

Lugar/es de elaboración: Via Liguria 28 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Italia.

Expediente N° 1-47-3110-1831-18-3

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.01.14 10:05:29 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO

SubAdministrador

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30716117594
Date: 2019.01.14 10:06:37 -0300



PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

**Sistema de reemplazo de articulación de cadera e instrumental asociado
Bioimpianti**

Nombre del fabricante: GRUPPO BIOIMPIANTI S.r.l

Dirección Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italia

Nombre del Importador: IPMAG SA

Dirección Sanchez de Bustamante 485 Caba. Argentina

INDICACIONES: Las indicaciones están relacionadas a patologías de cadera que requieren una artroplastia para reducir o eliminar el dolor y/o mejorar la función. Uso en esqueleto maduro

IMPLANTE

Producto médico de un solo uso

Producto médico ESTERIL

Métodos de esterilización:

Componentes metálicos por radiación (beta o gamma)

Componentes en UHMWPE óxido de etileno

INSTRUMENTAL

Producto médico No ESTERIL

Método de esterilización recomendado: autoclave por vapor 132°C

Almacenamiento/manipulación: ambiente limpio a temperatura ambiente. Ningún componente debe estar expuesto para dirigir la luz solar, la radiación ionizante, la temperatura y la contaminación de partículas

D.T. FARMACEUTICA María José Gallego - MN 11259

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM -1029-76

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IPMAG S.A.

MARIA JOSE GALLEGO
FARMACEUTICA
IF-2018-5586264-APN-DNPM#ANMAT
M.N. 11259

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS



DEFINICIONES

Podrán utilizarse símbolos en la etiqueta externa y/o en el envase (UNI CEI EN ISO 15223-1). En la siguiente tabla se indican las definiciones de dichos símbolos.

Tabla 1: definiciones de símbolos en la etiqueta

Símbolo	Definición
	Código de lote
	Número de catalogo
	No reutilizar
	Consultar las instrucciones de funcionamiento
	No utilizar si el embalaje está dañado
	Usar antes de
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Esterilizado con óxido de etileno
	Esterilizado con radiación

DESCRIPCIÓN

Grupo Bioimpianti S.r.l. tiene una amplia gama de dispositivos para el reemplazo de cadera. En general es acetabular copa, insertos, cabezas protésicas y vastagos femoral. Los vastagos se pueden dividir en dos grupos. El primero está representado por monobloque vástagos, mientras que el segundo grupo está representado por los vástagos modular que está constituido por dos componentes. Las copas acetabulares y vastagos femorales pueden ser o cementados o no cementados.

MATERIALES

Los materiales utilizados para la producción de los productos comercializados por Gruppo Bioimpianti ajustan a los estándares internacionales de la industria, asegurando, hasta la fecha, los mejores niveles de biocompatibilidad (ISO 5832). El ciclo de producción se complementa con una serie de controles de acuerdo con estándares de la industria (ISO 9001, ISO 13485).

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IRMAG. S.A.

IF-2018-5586256-AN-DNPM#ANMAT
MARIA JOSE GUARDO
FARMACEUTICA
M. J. 2018



Los materiales utilizados son en particular los siguientes:

Vastagos Femorales: acero inoxidable con alto contenido de nitrógeno {ISO 5832/9}, aleación de titanio Ti6Al4V {ISO 5832/3}, Ti6Al7Nb {ISO 5832/11}.

Los centralizadores distales están hechos de polimetilmetacrilato (PMMA).

Los cuellos de la prótesis Tours modulare están hechos de aleación de CrCoMo {ISO 5832/4}.

Cabezas protésicas: cerámica Biolox Delta {ISO 6474-2} y Biolox Forte {ISO 6474-1}, acero inoxidable con alto contenido de nitrógeno {ISO 5832/9}, CrCoMo {ISO 5832/12}.

Copas acetabulares: UHMWPE molecular ultra alto peso de polietileno {ISO 5834/2}, aleación de titanio Ti6Al4V según la norma ISO 5832/3, acero inoxidable con un alto contenido de nitrógeno {ISO 5832/9}.

Insertos para copas acetabulares: versión de peso molecular de polietileno ultra alto UHMWPE {ISO 5834/2}, también en versión reticulado y en la versión reticulado con adición de vitamina E, cerámica Biolox Delta {ISO 6474-2}.

ESTERILIZACIÓN

Se ofrecen los productos esterilizados (cumpliendo con la norma UNI EN 556).

En particular los componentes metálicos están esterilizados con rayos (Beta o Gamma), mediante modalidades previstas por la norma UNI EN ISO 11137-1;-2;-3, mientras que los componentes en UHMWPE, están esterilizados con óxido de etileno (ETO) mediante modalidades previstas por la norma UNI EN ISO 11135-1. La esterilización tiene una garantía de 10 años en ambos casos. El método de esterilización está indicado en la etiqueta junto a la fecha de caducidad que indica la fecha después de la cual no hay que utilizar el producto. El envase (doble embalaje) permite el desplazamiento de parte del personal no esterilizado durante la conservación del producto. En cambio, la extracción del producto del embalaje, tiene que hacerse por el personal entrenado. Si en cualquier momento de la fase de desembalaje ocurre una situación anómala, recomendamos no utilizar el producto, por el riesgo de contaminación del producto y recomendamos entregar el producto a Gruppo Bioimpianti para que efectúe de nuevo, si posible, un condicionamiento.

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IRVING S.A.

IF-2018-55862564-ANM#ANMAT
MARIA JOSE CALZEDO
FARMACEUTICA
M.N. 12259



Todos los producto están identificados en la etiqueta en el envase del producto, donde se indican el contenido, la talla (u otro parámetro que identifica la medida), el código, el lote de fabricación, el símbolo de esterilización con la fecha de caducidad y el método de esterilización utilizado. Para garantizar la localización externa después del implante, se facilitan unas etiquetas en el envase, hay que aplicar las etiquetas en el registro de las operaciones y en el registro clínico del paciente.

CONSERVACIÓN

Recomendamos conservar el dispositivo en el embalaje en un ambiente cuya higiene sea controlada. El sistema de confección garantiza la necesaria protección para evitar rayas, daños y contaminación del producto durante las normales fases de desplazamiento.

Manipular y conservar el producto con cuidado; para no dañar el envase: en el caso en que esto ocurra, después de una evaluación del producto, hay que devolverlo a Guppo Bioimpianti s.r.l. que efectuará la necesaria reelaboración o lo eliminará. No utilizar el dispositivo si el envase está abierto o dañado, o caducado.

INDICACIONES

Las indicaciones están relacionadas a patologías de cadera que requieren una artroplastia para reducir o eliminar el dolor y / o mejorar la función. Las pautas generales son:

- Trastornos degenerativos no inflamatorios como la artrosis de la carga conjunta en primaria o secundaria,
- La necrosis aséptica de la cabeza femoral
- Artritis reumatoide
- Artritis postraumática
- Corrección de la deformidad funcional
- Resultados de las fracturas del cuello femoral
- Resultados de las luxaciones traumáticas de cadera
- Los fallos de osteotomía
- Resultados de las artrodesis

INDICACIONES ESPECIFICAS

Dualis es una copa acetabular con dual movilidad está especialmente indicada en pacientes con alto riesgo de dislocación como pacientes

ROBERTO STAMANELLI
VICEPRESIDENTE
IPMAG S.A.

IF-2018-55862564-APN-IPMAG#ANMAT

MARIA JOSE GALEGO

FARMACIA
M.I. 11259



7

neurológicos (enfermedad de Alzheimer, apoplejía cerebral Outcomes, demencia, pacientes psiquiátricos, enfermedad de Parkinson), o apenas colaboradores.

La copa Dualis está presente en la versión cementada, adecuada para el implante con cemento, y la versión no cementada, indicada para implantes sin cemento.

La endoprótesis {Austin Moore, Thompson, Cúpula biarticulare JANUS) se muestran en las operaciones de hemiartroplastia en bases de fracturas cervicales del cuello femoral y articular directamente con el acetábulo natural.


Los vástagos Austin Moore y Thompson están indicados para implantes cementados.


La copa FIN DMD y la copa FIN DMD 9 agujeros están indicadas en caso de artroplastia primaria total para reducir o eliminar el dolor y / o mejorar la función de la articulación de la cadera. Las indicaciones clínicas específicas son las siguientes: enfermedades degenerativas de las articulaciones no inflamatorias tales como la osteoartritis primaria o secundaria; necrosis aséptica de la cabeza femoral; artritis reumatoide; corrección de deformidades funcionales; displasia de cadera; resultados de las fracturas del cuello femoral; resultados de las luxaciones de cadera traumáticas; fracasos de osteotomía; resultados de artrodesis. Estas copas, por su estructura tridimensional de la superficie, regular y porosa, están indicadas para la implantación sin cemento.


La Copa FIN DMD Multihole REV está indicada en los casos de cirugía de revisión de la artroplastia total de cadera en consecuencia de las siguientes condiciones: una falla mecánica de las prótesis primarias; la inestabilidad de las prótesis primarias; fractura periprotésica de la cadera; desgaste / osteolisis del inserto acetabular; aflojamiento aséptico; infección profunda. Esta copa es, por su estructura tridimensional de la superficie, regular y porosa, está indicada para la implantación sin cemento.

Las aumentaciones acetabulares para el sistema FIN DMD se indican en el caso de faltas de segmentos de huesos en el acetábulo superior y / o superior/posterior. La aumentación está indicada para la fijación a través de cemento en la superficie entre aumentación / copa y la superficie entre aumentación/ hueso acetabular restante. La fijación no cementada en la superficie entre aumentación/ hueso acetabular se produce a través de la presión y con el uso de tornillos de 6,5 mm.

El vástago SMR se indica en la cirugía de revisión de los componentes femorales, después de un fallo de la prótesis primaria cementado o no cementado con la pérdida de hueso proximal, la ampliación del canal medular y adelgazamiento del hueso cortical del fémur proximal. Revisión del componente femoral movilizó, después sub fractura de prótesis o periprotésica. Reconstrucción femoral en casos de alteraciones de la morfología ósea después de las fracturas u osteotomías. Este vástago está indicado para implante sin cemento.


ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IPREG. S.A.

IF-2018-55862564-APR-18-PM#ANMAT
MARIA JOSE GUTIERREZ
FARMACEUTICA
M.N. 11159

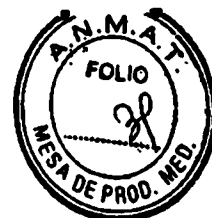


El vástago Cento se indica en la artroplastia parcial o total de la cadera para el tratamiento de las siguientes enfermedades: enfermedades de las articulaciones degenerativas no inflamatorias tales como osteoartritis, necrosis vasculares y displasia de cadera; artritis reumatoide;

osteoartritis como resultado de fracturas de la cabeza femoral. Por otra parte, este vástago se puede utilizar para la corrección de las deformidades funcionales. Este vástago está indicado para implante sin cemento.

El vástago MRP se indica en el cáncer del fémur proximal. En particular:

1. Tumores óseos malignos primarios que no impliquen estructuras neurovasculares
2. Los tumores metastásicos
3. Tumores óseos benignos que tienen una considerable expansión en los tejidos blandos (etapa 3) o fractura patológica

Este vástago está indicado para implante cementado, mediante el uso de cemento óseo.

Los vástagos y los acetabulares recubiertos con hidroxiapatita o titanio poroso plasma spray (indicado en la etiqueta) se indican para el implante no cementado.

CONTRAINDICACIONES

La operación de remplazo total de cadera está absolutamente contraindicada en caso de: infecciones locales o sistémicas, sepsis y osteomielitis.

Resulta relativamente contraindicada en caso de:

1. Osteoporosis;
2. Paciente no cooperativo o con trastornos neurológicos, incapaz de seguir las indicaciones;
3. Trastornos sistémico y/o metabólicos que llevan a un progresivo deterioro del soporte óseo;
4. Trastornos neurológicos o neuromusculares que puedan suponer un riesgo inaceptable a la inestabilidad de la prótesis o dar lugar a un fracaso de la fijación de la prótesis;
5. Osteomalacia;
6. Infección activa o sospecha de infección latente en la articulación de la cadera;
7. Fuentes de infección lejanas que podrían difundirse en la zona del implante;
8. Osteomielitis crónica o aguda persistente;

ROBERTO STANOANELLI
VICEPRESIDENTE
IPARG. S.A.

IF-2018-041862005-0000-PM#ANMAT
FARMACEUTICA
M.N 11259



9. Insuficiencia vascular, atrofia muscular, patologías neuromusculares;
10. Presencia incompleta o insuficiente de tejidos blandos alrededor de la articulación de rodilla;
11. Obesidad;
12. Reserva de hueso inadecuada para el apoyo o la fijación de la prótesis;
13. Pacientes con esqueleto inmaduro;
14. Patologías neoplásicas locales o extendida
15. Deformidades óseas graves incorregibles.

ADVERTENCIAS

Nunca combine componentes de diferentes fabricantes, porque puede haber diferentes tolerancias que pudieran mermar el resultado de la instalación. En particular, NUNCA utilizar vastagos y cabezas femorales de diferentes fabricantes, ya que los conos de acoplamiento podrían no ser compatibles. Gruppo Bioimpianti srl no es responsable de los problemas derivados de usos impropios. El cirujano debe ser consciente de que un paquete dañado o rayado puede afectar a la resistencia del vástago y conducir a la fractura prematura del mismo cuello del vástago.

1. Maneje el producto con cuidado para evitar rasguños accidentales, incluso durante los momentos de la cirugía. Un manejo inadecuado del dispositivo, antes de la operación y / o intra-operatorio, o cualquier daño a su carga, que puede conducir a la corrosión, falla por fatiga o desgaste excesivo. Utilice guantes limpios al manipular el dispositivo;
2. Use tornillos o accesorios de material adecuado: en el caso de un sistema compuesto de varios elementos que siempre utiliza los mismos elementos del kit; en el caso de copas acetabulares hechas de aleación de titanio (ISO 5832/3) para usar, si se considera necesario, sólo tornillos del mismo material;
3. Siga la técnica quirúrgica proporcionada por Grupo Bioimpianti;
4. Una limpieza completa y la eliminación de partículas de metal, cemento óseo, así como cualquier otro escombros resultantes de la cirugía, es necesario para minimizar el desgaste de la superficie articular;
5. No use el dispositivo si hay algún daño a la misma;
6. No altere el sistema en modo alguno;
7. La elección inadecuada, posicionamiento, alineación y fijación de uno o más componentes podría resultar en una incorrecta distribución de las tensiones, con la consiguiente reducción de la vida del implante de prótesis;

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IPMAG S.A.

IF-2018-15862365-FARMACIA#ANMAT
FARMACIA T.P.
M.N. 11259



8. Una alineación incorrecta o una planta no precisa pueden conducir a un fenómeno de desgaste excesivo y / ó el fracaso del propio sistema;
9. Todos los dispositivos implantables para el reemplazo de cadera son desechables, por lo tanto no deben ser reutilizados. La reutilización conduce a utilizar un sistema cargado por un uso anterior, que afecta a la resistencia a la fatiga y, por lo tanto, aumenta el riesgo de rotura;
10. No implantar un componente en un paciente si éste ya se había implantado, aunque de manera temporal, en otro paciente;
11. Utilice siempre el tornillo de seguridad adecuado en el vástago SMR (revisión) y MRP (tumor);
12. Para el vástago SMR, el tornillo de seguridad debe tener la misma longitud del componente proximal;
13. Para el vástago tumoral MRP, el tornillo de seguridad debe tener la misma longitud del componente proximal;
14. En cuanto a las aumentaciones acetabulares FIN DMD fijar la superficie entre aumentación / acetábulo mediante la fijación cementada y fijar la superficie entre aumentación/ hueso sin cemento por medio del press-fit y con tornillos de 6,5 mm de diámetro, que tienen que pasar a través de los orificios presentes en la misma aumentación. Nunca insertar los tornillos entre los dos componentes (copa y aumentación): de hecho, es necesario que la aumentación se fije a la copa solamente por medio de cemento para huesos, sin el uso de tornillos.
15. Es responsabilidad del cirujano determinar si la estabilidad y la fijación realizadas son adecuadas;
16. Pacientes fumadores pueden tener un retraso en la cicatrización, no recuperación y / o un deterioro de la estabilidad;
17. Es responsabilidad del cirujano asegurarse de que el paciente no es sensible a los materiales de los componentes del sistema mediante la prueba correspondiente.


Los dispositivos implantables para de reemplazo de cadera están diseñados para proporcionar las herramientas necesarias para reducir el dolor y restaurar la función articular. Aunque estos dispositivos tienen éxito en esto, no puede restaurar los niveles de actividad y la función fisiológica de la articulación.

PRECAUCIONES

El instrumental del sistema protésico realizado por Gruppo Bioimpianti, ha sido estudiado y realizado para proveer al cirujano los instrumentos para efectuar un implante fácil y seguro.

ROBERTO STANSANEL
VICEPRESIDENTE
IPMA S.A.

IF-2018-55862564-APN-ENEM#ANMAT
MARIA JOSE GALLEGO

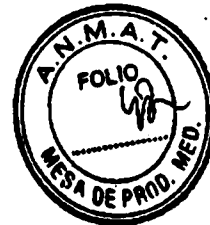

El uso de instrumentos y/o componentes que no están incluidos en el instrumental de Gruppo Bioimpianti S.r.l., salvo los instrumentos genéricos utilizados en la sala operatoria (barreno, cuchilla oscilante), pueden llevar a consecuencias negativas.

Cualquier rotura o alteración que se encuentre en el instrumental tiene que ser comunicada a la empresa. Por el paso del tiempo, los instrumentos quirúrgicos están inevitablemente sujetos al desgaste, si se utilizan con fuerzas excesivas pueden romperse. Hay que utilizar los instrumentos quirúrgicos para la finalidad prevista, como se enseña en la técnica operatoria proporcionada por Gruppo Bioimpianti. Recomendamos la ejecución de controles periódicos de los instrumentos para asegurarse con antelación que no haya ningún daño.

No hay que dejar en la sala operatoria ningún componente de muestra, envase, instrumento o parte de eso.

INDICACIONES PREOPERATORIAS

En general recomendamos efectuar siempre un atento análisis preoperatorio, para identificar el sistema mejor y la talla correcta considerando las condiciones clínicas del paciente (edad, actividad física y laboral, peso, eventualmente enfermedades mentales, osteoporosis, patologías vasculares). El cirujano tiene que estar familiarizado con el implante, el instrumental y la técnica quirúrgica antes de la operación. Por lo que se refiere a la técnica operatoria, Gruppo Bioimpianti ofrece indicaciones relativas a sus productos. Además de la documentación, Gruppo Bioimpianti está disponible para colaboraciones profesionales entre médicos que ya han utilizado los sistemas y los médicos interesados.

La selección de los pacientes es fundamental, durante la cual hay que considerar unos factores importantes:

1. Es necesario que el paciente tenga un esqueleto maduro;
2. Necesidad de eliminar el dolor de la articulación y aumentar la funcionalidad;
3. Capacidad y voluntad del paciente de seguir las indicaciones, incluidas las relativas al control del peso y al nivel de actividad adecuado;
4. Peso del paciente: un peso excesivo puede originar una alta carga en el dispositivo que puede conducir a una falla temprana;
5. Nivel de actividad y ocupación;
6. Nivel de salud del paciente.

El paciente tiene que ser consciente de los riesgos quirúrgicos y de los posibles efectos adversos. Hay que avisar al paciente de las limitaciones de la reconstrucción y de la exigencia de proteger el implante de una carga

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
I.R.C.G. S.A.

IF-2018-55862564-APN 83-B-1300-MAT
FARMACÉUTICA
H.I. 1259



completa, hasta alcanzar una fijación adecuada y la recuperación. El paciente no tendrá que tener expectativas funcionales irreales por lo que se refiere a ocupaciones y actividades como la carrera, levantamiento de pesos y la marcha durante mucho tiempo. Un movimiento y/o una actividad excesivos o inusuales, un trauma, peso excesivo y/o obesidad, pueden causar el fracaso prematuro del implante. El paciente debe saber que la prótesis no reemplaza el hueso normal y saludable, que puede romperse o dañarse como resultado de cierta actividad o trauma, que tiene una vida útil limitada y puede ser sustituida en el futuro. El paciente debe estar obligado a informar al cirujano cualquier ruido o sensación anormal, ya que pueden ser signos de mal funcionamiento.

INDICACIONES POSTOPERATORIAS

Después de la operación hay que apoyar al paciente explicándole los límites de la fase postoperatoria. El paciente debe seguir las indicaciones postoperatorias proporcionadas, incluidas las procedentes de las visitas de control y debe ser consciente del hecho que una correcta rehabilitación es fundamental para que el implante tenga éxito. De hecho, aunque el paciente tiene que recuperar las funcionalidad propia de la articulación, hay que colaborar para la superación de la condición patológica y, como lo requieren las especificaciones biomecánicas, hay que integrar el dispositivo para que favorezca el proceso normal de crecimiento óseo. Para que esto ocurra, es necesario prever la reintegración social controlada a través de exámenes y evaluaciones radiológicas, para garantizar las cargas que se aplican a la articulación y, por consecuencia, al dispositivo. Salvo en los primeros momentos, nuestros dispositivos no crean al paciente problemas particulares para las relaciones sociales normales; en el caso en que esto se verifique, recomendamos informar el interesado. Recomendamos la ejecución periódicas de radios X de control.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Los posibles efectos secundarios que pueden derivarse de la utilización de un sistema de prótesis, son los clásicos que pueden derivarse de una artroplastia de cadera y incluyen lo siguiente:

1. Osteólisis (reabsorción progresiva del hueso). Osteolisis puede ser asintomática por lo que es esencial llevar a cabo evaluaciones regulares de la serie radiográfica para evitar complicaciones futuras
2. Las partículas que pueden conducir a un mayor desgaste en la necesidad de revisión temprana;
3. Temprana o tardía infección que puede implicar la necesidad de retirar el implante;
4. Las reacciones alérgicas;

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IPMAG S.A.

IF-2018-55862564-APN/ANMAT
MARIA JOSE GALLEGO
FARMACEUTICA
M.N. 11259

5. fracturas intraoperatorias especialmente en la presencia de una baja densidad ósea debido a defectos de la osteoporosis, los huesos resultantes de las intervenciones anteriores, la resorción ósea, o la inserción del dispositivo;
6. Daño a los vasos sanguíneos o hematoma;
7. La dislocación, la migración y / o subluxación del implante debido a un traumatismo, fijación incorrecta, pérdida de fijación, la desalineación, la colocación incorrecta, la resorción ósea, la laxitud del tejido blando, el movimiento repentino y / o natural y / o actividad excesiva;
8. Calcificaciones periarticulares u osificación, con o sin impedimentos a la movilidad articular;
9. Variación no deseada de la longitud de la extremidad;
10. Reducción del rango de movimiento debido a una elección incorrecta o una mala colocación del implante, o pinzamiento femoral.
11. Rotura debido a la fatiga de una de las componentes resultantes de una pérdida en la fijación o no fijación completa, la actividad vigorosa, el trauma, la desalineación o el peso excesivo.;
12. Corrosión en la interfase entre los componentes;
13. El desgaste y / o deformación de las superficies articulares;
14. Dolor;
15. Fractura ósea dolor intraoperatoria y / o post-operatoria;
16. Ruido audible durante el movimiento;
17. Daño nervioso;
18. Avulsión trocantérea como resultado de la tensión muscular excesiva, una carga temprana o una reinserción no adecuada;
19. Problemas de rodilla o tobillo de la extremidad afectada o contralateral exacerbada por una discrepancia en la longitud de las extremidades, por el exceso de medialización femoral o deficiencias musculares.

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IPMAG S.A.

IF-2018-55862564-APN-DN#ANMAT
MARIA JOSE GALLEGO
FARMACEUTICA
M.C. 11259



PROYECTO DE ROTULO

Sistema de reemplazo de articulación de cadera e instrumental asociado

Bioimpianti

MODELO XXXX

Nombre del fabricante: GRUPPO BIOIMPIANTI S.r.l

Dirección Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italia

Nombre del Importador: IPMAG SA

Dirección **Sanchez de Bustamante 485 Caba. Argentina**

LOTE

VENCIMIENTO

Producto médico ESTERIL

Componentes metálicos por radiación (beta o gamma)

Componentes en UHMWPE óxido de etileno

Producto médico de un solo uso

Ver instrucciones de uso

Almacenamiento/manipulación: ambiente limpio a temperatura ambiente. Ningún componente debe estar expuesto para dirigir la luz solar, la radiación ionizante, la temperatura y la contaminación de partículas

D.T. FARMACEUTICA María José Gallego - MN 11259

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM -1029-76

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IPMAG S.A.

ROBERTA SORIANO GALLEGO
IF-2018-55862564-V-000000000000-ANMAT
IPMAG S.A. MN 11259



PROYECTO DE ROTULO de INSTRUMENTAL

Instrumental asociado al Sistema de reemplazo de articulación de cadera

Bioimpianti

MODELO XXXX

Nombre del fabricante: GRUPPO BIOIMPIANTI S.r.l

Dirección Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italia

Nombre del Importador: IPMAG SA

Dirección Sanchez de Bustamante 485 Caba. Argentina

LOTE

VENCIMIENTO

Producto médico No ESTERIL

Método de esterilización recomendado: autoclave por vapor 132°C

Ver instrucciones de uso

Almacenamiento/manipulación: ambiente limpio a temperatura ambiente. Ningún componente debe estar expuesto para dirigir la luz solar, la radiación ionizante, la temperatura y la contaminación de partículas

D.T. FARMACEUTICA María José Gallego - MN 11259

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM -1029-76

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

ROBERTO STANCANELLI
VICEPRESIDENTE
IPMAG S.A.

MARIA JOSE GALLEGO
VICEPRESIDENTE
IPMAG S.A.
IF-2018-55862504-VI
ANMAT



PROYECTO DE TARIETA DE IMPLANTE (Original)

Sistema de reemplazo de articulación de cadera e Instrumental Asociado

Bioimpianti

Número de Lote:

Nombre del fabricante: GRUPPO BIOIMPIANTI S.r.l

Dirección Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italia

Nombre del Importador: IPMAG SA

Dirección Sanchez de Bustamante 485 .C1173ABG- C. A.B. A

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T - PM - 1029-76

Nombre del Centro Sanitario donde se realiza la implantación:.....

Fecha:.....

D.N.I. del paciente:.....

Nombre y Apellido Del médico:

Matricula Profesional :

DNI


ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IPMAG. S.A.


MARIA JOSE GALLEGO
FARMACEUTICA
M.N 11259

IF-2018-55862564-APN-DNPM#ANMAT



PROYECTO DE TARIETA DE IMPLANTE (Duplicado)

Sistema de reemplazo de articulación de cadera e Instrumental Asociado
Bioimpianti

Número de Lote:

Nombre del fabricante: GRUPPO BIOIMPIANTI S.r.l
Dirección Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italia

Nombre del Importador: IPMAG SA
Dirección Sanchez de Bustamante 485 .C1173ABG- C. A.B. A

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T - PM - 1029-76

Nombre del Centro Sanitario donde se realiza la implantación:.....

Fecha:.....

D.N.I. del paciente:.....

Nombre y Apellido Del médico:

Matricula Profesional :

DNI

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IPMAG. S.A.

MARIA JOSE GALLER
FARMACEUTICA
M.N. 11259
IF-2018-55862564-APN-DNPM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-55862564-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 1 de Noviembre de 2018

Referencia: 1-47-3110-1831-18-3

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.11.01 14:46:06 -0300

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.11.01 14:46:07 -0300

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-1831-18-3

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por IPMag S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de reemplazo de articulación de cadera e instrumental asociado.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-166 PROTESIS, DE ARTICULACION, PARA CADERA

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Bioimpianti.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: indicado en patologías de cadera que requieren una artroplastia para reducir o eliminar el dolor y/o mejorar la función. Las pautas generales son:

-Trastornos degenerativos no inflamatorios como la artrosis de la carga conjunta en primaria o secundaria.

-La necrosis aséptica de la cabeza femoral.

- Artritis reumatoidea.
- Artritis postraumática.
- Corrección de la deformidad funcional.
- Resultados de las fracturas del cuello femoral.
- Resultado de las luxaciones traumáticas de cadera.
- Los fallos de osteotomía.
- Resultados de las artrodesis.

Modelos:

Cotilo FIN DMD Multihole REV

110353046 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 46mm

110353048 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 48mm

110353050 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 50mm

110353052 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 52mm

110353054 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 54mm

110353056 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 56mm

110353058 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 58mm

110353060 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 60mm

110353062 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 62mm

110353064 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 64mm

110353066 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 66mm

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-9800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 965, CABA

Sede Aisina
Aisina 669/671, CABA

Sede INAME
Río de Janeiro 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1430, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios del Espino 1000
San Martín 1969, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Osorio Negro 635,
Córdoba
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117 - km. 10
C.O.T.E.C.A.R., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1107,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

110353068 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 68mm

110353070 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 70mm

110353072 Cotilo FIN DMD Multihole REV diám. 72mm

Cotilo FIN DMD Ninehole

110354048 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 48mm

110354050 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 50mm

110354052 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 52mm

110354054 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 54mm

110354056 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 56mm

110354058 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 58mm

110354060 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 60mm

110354062 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 62mm

110354064 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 64mm

110354066 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 66mm

110354068 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 68mm

110354070 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 70mm

110354072 Cotilo FIN DMD Ninehole diám. 72mm

Cotilo FIN DMD

110355046 Cotilo FIN DMD diám. 46mm

110355048 Cotilo FIN DMD diám. 48mm

110355050 Cotilo FIN DMD diám. 50mm

110355052 Cotilo FIN DMD diám. 52mm

110355054 Cotilo FIN DMD diám. 54mm

110355056 Cotilo FIN DMD diám. 56mm

110355058 Cotilo FIN DMD diám. 58mm

110355060 Cotilo FIN DMD diám. 60mm

110355062 Cotilo FIN DMD diám. 62mm

110355064 Cotilo FIN DMD diám. 64mm

110355066 Cotilo FIN DMD diám. 66mm

110355068 Cotilo FIN DMD diám. 68mm

110355070 Cotilo FIN DMD diám. 70mm

110355072 Cotilo FIN DMD diám. 72mm

AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR

110356144 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 44/46 Gr.15mm

110356244 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 44/46 Gr.20mm

110356344 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 44/46 Gr.25mm

110356148 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 48/50 Gr.15mm

110356248 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 48/50 Gr.20mm



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4707-0000 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alonsa 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Ezebras Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km. 10,
CO.TS.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

110356348 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 48/50 Gr.25mm
110356152 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 52/54 Gr.15mm
110356252 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 52/54 Gr.20mm
110356352 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 52/54 Gr.25mm
110356156 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 56/58 Gr.15mm
110356256 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 56/58 Gr.20mm
110356356 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 56/58 Gr.25mm
110356160 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 60/62 Gr.15mm
110356260 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 60/62 Gr.20mm
110356360 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 60/62 Gr.25mm
110356164 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 64/66 Gr.15mm
110356264 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 64/66 Gr.20mm
110356364 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 64/66 Gr.25mm
110356168 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 68/70 Gr.15mm
110356268 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 68/70 Gr.20mm
110356368 AUMENTO EN CUÑA ACETABULAR 68/70 Gr.25mm
TORNILLO DISTAL EVO-NAIL HEX.3,5MM
140401232 TORNILLO DISTAL EVO-NAIL HEX. 3,5MM L.32,5
140401237 TORNILLO DISTAL EVO-NAIL HEX. 3,5MM L.37,5

140401242 TORNILLO DISTAL EVO-NAIL HEX. 3,5MM L.42,5
140401247 TORNILLO DISTAL EVO-NAIL HEX. 3,5MM L.47,5
SET DE INSTRUMENTAL FIN DMD WEDGE
110383300 BANDEJA Y TAPA FIN DMD WEDGE
110383280 PINZA PARA SUJETAR AUMENTO EN CUÑA
110383285 POSICIONADOR DE AUMENTO EN CUÑA
110383290 DESTORNILLADOR FLEXIBLE FIN DMD
110383044 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 44/46 GR. 15mm
110383144 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 44/46 GR. 20mm
110383244 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 44/46 GR. 25mm
110383048 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 48/50 GR. 15mm
110383148 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 48/50 GR. 20mm
110383248 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 48/50 GR. 25mm
110383052 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 52/54 GR. 15mm
110383152 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 52/54 GR. 20mm
110383252 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 52/54 GR. 25mm
110383056 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 56/58 GR. 15mm
110383156 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 56/58 GR. 20mm
110383256 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 56/58 GR. 25mm

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4140-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 860, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escobar 14
San Martín 1969, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Corripio Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 17, km. 11
CO.TE.CAR, Base de
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Rojas, González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

110383060 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 60/62 GR. 15mm

110383160 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 60/62 GR. 20mm

110383260 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 60/62 GR. 25mm

110383064 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 64/66 GR. 15mm

110383164 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 64/66 GR. 20mm

110383264 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 64/66 GR. 25mm

110383068 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 68/70 GR. 15mm

110383168 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 68/70 GR. 20mm

110383268 AUMENTO EN CUÑA DE PRUEBA 68/70 GR. 25mm

CABEZAS FEMORALES

110205105E CABEZA REX 28MM 12/14 CUELLO CORTO

110205110E CABEZA REX 28MM 12/14 CUELLO MEDIANO

110205115E CABEZA REX 28MM 12/14 CUELLO LARGO

110205120E CABEZA REX 28MM 12/14 CUELLO EXTRA LARGO

110205125E CABEZA REX 28MM 12/14 CUELLO XXL

110205205E CABEZA REX 32MM 12/14 CUELLO CORTO

110205210E CABEZA REX 32MM 12/14 CUELLO MEDIANO

110205215E CABEZA REX 32MM 12/14 CUELLO LARGO

110205220E CABEZA REX 32MM 12/14 CUELLO EXTRA LARGO

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4731-9800 <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 860, CABA

Sede Aisina
Aisina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Emancipación 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios del Escorial 116,
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 111 y 112,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Córdoba

Deleg. Posadas
Ruta 10 y 1117,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 110205225E CABEZA REX 32MM 12/14 CUELLO XXL
- 110210105E CABEZA COCR 28MM 12/14 CUELLO CORTO
- 110210110E CABEZA COCR 28MM 12/14 CUELLO MEDIANO
- 110210115E CABEZA COCR 28MM 12/14 CUELLO LARGO
- 110210120E CABEZA COCR 28MM 12/14 CUELLO EXTRA LARGO
- 110210125E CABEZA COCR 28MM 12/14 CUELLO XXL
- 110220105E CABEZA COCR 32MM 12/14 CUELLO CORTO
- 110220110E CABEZA COCR 32MM 12/14 CUELLO MEDIANO
- 110220115E CABEZA COCR 32MM 12/14 CUELLO LARGO
- 110220120E CABEZA COCR 32MM 12/14 CUELLO EXTRA LARGO
- 110220125E CABEZA COCR 32MM 12/14 CUELLO XXL
- 110367705 CABEZA COCR 36MM 12/14 CUELLO CORTO
- 110367710 CABEZA COCR 36MM 12/14 CUELLO MEDIANO
- 110367715 CABEZA COCR 36MM 12/14 CUELLO LARGO
- 110367720 CABEZA COCR 36MM 12/14 CUELLO EXTRA LARGO
- 110240205 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 28MM 12/14 CUELLO
CORTO
- 110240210 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 28MM 12/14 CUELLO
MEDIANO



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 43 40-0600 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
 Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
 Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
 Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza
 Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba,
 Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, Km. 10,
 CO. TE. CAR., Paso de los
 Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
 Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de
 Misiones

Deleg. Santa Fé
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,
 Prov. de Santa Fé

110240215 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 28MM 12/14 CUELLO

LARGO

110240305 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 32MM 12/14 CUELLO

CORTO

110240310 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 32MM 12/14 CUELLO

MEDIANO

110240315 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 32MM 12/14 CUELLO

LARGO

110240320 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 32MM 12/14 CUELLO

EXTRA LARGO

110240405 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 36MM 12/14 CUELLO

CORTO

110240410 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 36MM 12/14 CUELLO

MEDIANO

110240415 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 36MM 12/14 CUELLO

LARGO

110240420 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 36MM 12/14 CUELLO

EXTRA LARGO

110240505 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 40MM 12/14 CUELLO

CORTO

110240510 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 40MM 12/14 CUELLO

MEDIANO

110240515 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 40MM 12/14 CUELLO

LARGO

110240520 CABEZA DE CERÁMICA "BIOLOX DELTA" 40MM 12/14 CUELLO

EXTRA LARGO

110241105E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO CORTO

12/14 28MM

110241110E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO MEDIANO

12/14 28MM

110241115E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO LARGO

12/14 28MM

110241120E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO EXTRA

LARGO 12/14 28MM

110242105E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO CORTO

12/14 32MM

WMS

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4310-3300 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 859, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza
 Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
 Córdoba,
 Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
 CO.TE.CAR., Paso de los
 Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de
 Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
 Santa Fé,
 Prov. de Santa Fé

110242110E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO MEDIANO

12/14 32MM

110242115E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO LARGO

12/14 32MM

110242120E CABEZA DE CERÁMICA BIOLOX OPTION CUELLO EXTRA

LARGO 12/14 32MM

CABEZAS CEFÁLICAS

110800040C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.40MM S.N.

110800040M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.40MM M.N.

110800040L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.40MM L.N.

110800042C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.42MM S.N.

110800042M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.42MM M.N.

110800042L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.42MM L.N.

110800044C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.44MM S.N.

110800044M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.44MM M.N.

110800044L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.44MM L.N.

110800046C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.46MM S.N.

110800046M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.46MM M.N.

110800046L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.46MM L.N.

- 110800048C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.48MM S.N.
- 110800048M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.48MM M.N.
- 110800048L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.48MM L.N.
- 110800050C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.50MM S.N.
- 110800050M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.50MM M.N.
- 110800050L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.50MM L.N.
- 110800052C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.52MM S.N.
- 110800052M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.52MM M.N.
- 110800052L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.52MM L.N.
- 110800054C CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.54MM S.N.
- 110800054M CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.54MM M.N.
- 110800054L CABEZA CEFÁLICA 12/14 DIÁ.54MM L.N.

MRP

- 110266107 ESPACIADOR CILÍNDRICO "MRP" L. 50 MM
- 110266100 COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN "MRP" L.75 MM
- 110266101 COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN "MRP" L.100 MM
- 110266102 COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN "MRP" L.125 MM
- 110266103 COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN "MRP" L.150 MM

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 859, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117 km.10,
CO. TE. CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 110266104 COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN "MRP" L.175 MM
- 110266105 COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN "MRP" L.200 MM
- 110266022 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 140MM DIÁ. 12MM
- 110266024 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 160MM DIÁ. 12MM
- 110266026 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 180MM DIÁ. 12MM
- 110266030 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 140MM DIÁ. 13MM
- 110266032 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 160MM DIÁ. 13MM
- 110266034 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 180MM DIÁ. 13MM
- 110266038 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 140MM DIÁ. 14MM
- 110266040 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 160MM DIÁ. 14MM
- 110266042 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 180MM DIÁ. 14MM
- 110266044 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 140MM DIÁ. 16MM
- 110266046 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 160MM DIÁ. 16MM
- 110266048 COMPONENTE DISTAL DE RESECCIÓN "MRP" 180MM DIÁ. 16MM
- 110266110 TORNILLO "MRP" L.75MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN
- 110266111 TORNILLO "MRP" L.100MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN

WBS

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4 30 9800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 859, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escobar 1009,
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 1, 17 y 1000,
CC TE CAR, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Ruta 120 km 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

110266112 TORNILLO "MRP" L.125MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN

110266113 TORNILLO "MRP" L.150MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN

110266114 TORNILLO "MRP" L.175MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN

110266115 TORNILLO "MRP" L.200MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN

110266116 TORNILLO "MRP" L.225MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN

110266117 TORNILLO "MRP" L.250MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN

110266118 TORNILLO "MRP" L.275MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN

110266119 TORNILLO "MRP" L.300MM PARA COMPONENTE PROXIMAL DE RESECCIÓN

INSTRUMENTAL MRP

110266100 BANDEJA PARA INSTRUMENTAL

110266200 PRUEBA PARA COMPONENTE PROXIMAL L. 75 MM

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4940-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 369, CABA

Sede Alsina
Alicia 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caceres 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalante de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, Km. 10,
CO.FE.CAR, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Recua Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

110266201 PRUEBA PARA COMPONENTE PROXIMAL L. 100 MM

110266202 PRUEBA PARA COMPONENTE PROXIMAL L. 125 MM

110266203 PRUEBA PARA COMPONENTE PROXIMAL L. 150 MM

110266204 PRUEBA PARA COMPONENTE PROXIMAL L. 175 MM

110266205 PRUEBA PARA COMPONENTE PROXIMAL L. 200 MM

110266207 ESPACIADOR DE PRUEBA L. 50MM

120540412 EJE NO GIRATORIO SMR

110380860 CABEZA DE PRUEBA 28MM S.N.

110380870 CABEZA DE PRUEBA 28MM M.N.

110380880 CABEZA DE PRUEBA 28MM L.N.

110380890 CABEZA DE PRUEBA 28MM XL.N.

110266220 EXTRACTOR PARA COMPONENTE PROXIMAL 75-100-125

110266221 EXTRACTOR PARA COMPONENTE PROXIMAL 150-175-200

110266222 EXTRACTOR PARA COMPONENTE PROXIMAL 225-250

110266225 VARILLA DE MONTAJE

120540405 DESTORNILLADOR

COTILO ACETABULAR CON HA FIN II

110350144H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 44MM



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4 31-9800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 969, CABA

Sede Alsina
 Alsina 565, 671, CABA

Sede INAME
 Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAI
 Estación Amélie, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalarte de
 San Martín 1900, Mendoza
 Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba,
 Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, km. 10
 C/011, 24F, Paso de los
 Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
 Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de
 Misiones

Deleg. Santa Fé
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,
 Prov. de Santa Fé

- 110350146H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 46MM
- 110350148H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 48MM
- 110350150H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 50MM
- 110350152H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 52MM
- 110350154H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 54MM
- 110350156H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 56MM
- 110350158H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 58MM
- 110350160H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 60MM
- 110350162H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 62MM
- 110350164H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 64MM
- 110350166H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 66MM
- 110350168H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 68MM
- 110350170H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 70MM
- 110350172H COTILO FIN II CON HA DIÁ. 72MM
- COTILO ACETABULAR FIN MB
- 110352044 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 44MM
- 110352046 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 46MM
- 110352048 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 48MM
- 110352050 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 50MM
- 110352052 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 52MM
- 110352054 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 54MM

MPG

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
 Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
 Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
 Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalonia de
 San Martín 1969, Mendoza
 Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba
 Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, km. 10,
 CO.TE.CAR., Paso de los
 Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
 Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de
 Misiones

Deleg. Santa Fé
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,
 Prov. de Santa Fé

- 110352056 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 56MM
- 110352058 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 58MM
- 110352060 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 60MM
- 110352062 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 62MM
- 110352064 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 64MM
- 110352066 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 66MM
- 110352068 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 68MM
- 110352070 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 70MM
- 110352072 COTILO FIN MB ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 72MM
- COTILO ACETABULAR FIN II
- 110350144 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 44MM
- 110350146 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 46MM
- 110350148 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 48MM
- 110350150 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 50MM
- 110350152 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 52MM
- 110350154 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 54MM
- 110350156 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 56MM
- 110350158 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 58MM
- 110350160 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 60MM
- 110350162 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 62MM
- 110350164 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 64MM

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4310-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central Av. de Mayo 869, CABA	Sede Alsina Alsina 665/671, CABA	Sede INANE Av. Caseros 2161, Ezeiza	Sede INAL Ciudad Unidos 25, CABA	Sede Prod. Médicos Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Remedios de Escobar de San Martín 1909, Mendoza Prov. de Mendoza	Deleg. Córdoba Obispo Trejo 635, Córdoba, Prov. de Córdoba	Deleg. Paso de los Libres Ruta Nacional 117 km. 10, COTECAR, Paso de los Libres, Prov. de Corrientes	Deleg. Posadas Arces Gonzalez 1137, Posadas, Prov. de Misiones	Deleg. Santa Fé Eva Perón 2456, Santa Fé, Prov. de Santa Fé

- 110350166 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 66MM
- 110350168 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 68MM
- 110350170 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 70MM
- 110350172 COTILO FIN II ROCIADO CON PLASMA DIÁ. 72MM
- 110364244 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN 44-46
- 110364248 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN 48-50
- 110364252 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN 52-54
- 110364256 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN 56-58
- 110364260 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN 60-72
- 110364344 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN 44-46
- 110364348 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN 48-50
- 110364352 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN 52-54
- 110364356 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN 56-58
- 110364360 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN 60-72
- 110361144 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
44/46
- 110361248 INTERNO 32MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
48/50
- 110361252 INTERNO 32MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
52/54

WMB

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 260, CABA

Sede Alsina
 Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
 Av. Cazeros 2161, CABA

Sede INAL
 Potosí, Unidas 25, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza
 Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba,
 Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, km 10,
 CO. TE. CAR., Paso de los
 Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
 Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de
 Misiones

Deleg. Santa Fé
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,
 Prov. de Santa Fé

- 110361256 INTERNO 32MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
56/58
- 110361352 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
52/54
- 110361356 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
56/58
- 110361360 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
60/72
- 110361364 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
64/72
- 110361460 INTERNO 40MM - 5° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
60/72
- 110362144 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
44/46
- 110362248 INTERNO 32MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
48/50
- 110362252 INTERNO 32MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
52/54
- 110362256 INTERNO 32MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
56/58

Sedes y Delegaciones

Tel. (011) 4311-1100/9800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 880, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 1161, Tucumán

Sede INAL
Provincia de Buenos Aires, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, Pta. 10,
CO. TE. CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Rafael González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 110362352 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
 52/54
- 110362356 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
 56/58
- 110362360 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
 60/72
- 110362364 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO DIÁ.
 64/72
- 110362460 INTERNO 40MM - 0° PARA SISTEMA FIN POLIETILENO RETICULADO
 DIÁ. 60/72
- 110363144 INTERNO 28MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 44/46
- 110363148 INTERNO 32MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 48/50
- 110363152 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 52/54
- 110363156 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 56/58
- 110363160 INTERNO 36MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 60/72
- 110363252 INTERNO 32MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 52/54
- 110363256 INTERNO 32MM - 0° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 56/58
- 110363344 INTERNO 28MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 44/46
- 110363348 INTERNO 32MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 48/50
- 110363352 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 52/54
- 110363356 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 56/58

WMB

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0600 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 569, CABA

Sede Alsina
 Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
 Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
 Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza
 Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba,
 Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, km.10,
 CO TELCAR, paso de los
 Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
 Pogue Gonzalez 1137,
 Posadas, Prov. de
 Misiones

Deleg. Santa Fé
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,
 Prov. de Santa Fé

- 110363360 INTERNO 36MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 60/72
- 110363452 INTERNO 32MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 52/54
- 110363456 INTERNO 32MM - 5° PARA SISTEMA FIN XLPE + VIT. E DIÁ. 56/58
- 110367848 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 48-50
INTERNO 28MM
- 110367852 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 52-54
INTERNO 28MM
- 110367856 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 56-58
INTERNO 28MM
- 110367044 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 44-46 INTERNO
28MM
- 110367048 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 48-50 INTERNO
32MM
- 110367052 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 52-54 INTERNO
32MM
- 110367056 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 56-58 INTERNO
32MM
- 110367060 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 60-72 INTERNO
32MM
- 110367064 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 64-66 INTERNO
32MM

Sedes y Delegaciones

Tel: (+54-11) 4310-2800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 980 - B1000

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Caseros 2161, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escobar de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, 24310
CO. TE. CAR, Paso de los
Libres, Prov. de Córdoba

Deleg. Posadas
Ruta González 1107,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 110367152 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 52-54 INTERNO
36MM
- 110367156 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 56-58 INTERNO
36MM
- 110367160 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 60-72 INTERNO
36MM
- 110367164 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 64-72 INTERNO
36MM
- 110367176 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 56-58 INTERNO
40MM
- 110367180 INSERTO DE CERÁMICA BIOLOX DELTA PARA SISTEMA FIN 60-72 INTERNO
40MM
- 110364600 TAPÓN CON BLOQUEO PARA FIN II
- 110364601 TAPÓN DE FONDO PARA FIN II
- 110364620 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 20MM
- 110364625 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 25MM
- 110364630 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 30MM
- 110364635 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 35MM
- 110364640 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 40MM
- 110364645 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 45MM
- 110364650 TORNILLO PARA COTILO FIN II L. 50MM

WRB

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4010-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 859, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalera de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km 10
CO. TE CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

ANILLO DE REVISIÓN

110351152 ANILLO DE REVISIÓN PARA COTILO FIN II 52-54

110351156 ANILLO DE REVISIÓN PARA COTILO FIN II 56-58

110351160 ANILLO DE REVISIÓN PARA COTILO FIN II 60-72

200840015 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 15MM

200840020 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 20MM

200840025 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 25MM

200840030 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 30MM

200840035 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 35MM

200840040 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 40MM

200840045 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 45MM

200840050 TORNILLO PARA ANILLO DE REVISIÓN L. 50MM

INSTRUMENTAL PARA COTILO ACETABULAR FIN

110380344 ADAPTADOR PARA FIN II 44-50

110380348 ADAPTADOR PARA FIN II 48-50

110380352 ADAPTADOR PARA FIN II 52-58

110380356 ADAPTADOR PARA FIN II 56-58

110380360 ADAPTADOR PARA FIN II 60-72

110380400 ADAPTADOR DE INSERTADOR PARA INSERTO DE POLIETILENO 0°

110380420 IMPACTOR PARA FIN II

110380828 EXTRACTOR DE CERÁMICA FIN II

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-011) 5342-9800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 569/571, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 1, B. CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km 10
CO. TR. CAR, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fe

- 110381601 EXTRACTOR DE INSERTO DE POLIETILENO 44-50
- 110381602 EXTRACTOR DE INSERTO DE POLIETILENO 52-58
- 110381603 EXTRACTOR DE INSERTO DE POLIETILENO 60-62
- 110381640 IMPACTOR PARA COTILO DE PRUEBA
- 110381641 IMPACTOR PARA INSERTO DE POLIETILENO
- 110381644 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 44MM
- 110381646 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 46MM
- 110381648 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 48MM
- 110381650 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 50MM
- 110381652 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 52MM
- 110381654 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 54MM
- 110381656 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 56MM
- 110381658 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 58MM
- 110381660 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 60MM
- 110381662 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 62MM
- 110381664 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 64MM
- 110381666 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 66MM
- 110381668 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 68MM
- 110381670 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 70MM
- 110381672 COTILO DE PRUEBA PARA FIN II 72MM
- 110381680 DESTORNILLADOR PARA FIN II

MB

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4540-0300 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 365, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 1161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.FE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 110381681 PINZA PARA TORNILLOS
- 110381700 BANDEJA SUPERIOR FIN II
- 110381701 BANDEJA INFERIOR FIN II
- 110381705 BASE PARA CUBIERTA FIN II
- 110381706 BANDEJA PARA COTILOS DE PRUEBA FIN II
- 110381707 BANDEJA PARA IMPACTORES FIN II
- 110382044 INSERTO DE PRUEBA 44-46 - 0°
- 110382048 INSERTO DE PRUEBA 48-50 - 0°
- 110382052 INSERTO DE PRUEBA 52-54 - 0°
- 110382056 INSERTO DE PRUEBA 56-58 - 0°
- 110382060 INSERTO DE PRUEBA 60-62 - 0°
- 110382144 INSERTO DE PRUEBA 44-46 - 5°
- 110382148 INSERTO DE PRUEBA 48-50 - 5°
- 110382152 INSERTO DE PRUEBA 52-54 - 5°
- 110382156 INSERTO DE PRUEBA 56-58 - 5°
- 110382160 INSERTO DE PRUEBA 60-62 - 5°
- 110382348 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 48-50
- 110382352 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 52-54
- 110382356 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 56-58
- 110382360 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 60-62
- 110382364 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 64-72

LMB

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 41 40 0600 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 849, CABA

Sede Aisina

Aisina 565/671, CABA

Sede INAMF

Av. Caseros 2161, 1700

Sede INAL

Francia 1400/15, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escobar 4 de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 535,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km. 5,
CO.FE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Parque González 1137,
Rosetas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 110382452 INSERTO DE PRUEBA 36MM 0° 52-58
- 110382460 INSERTO DE PRUEBA 36MM 0° 60-62
- 110382464 INSERTO DE PRUEBA 36MM 0° 64-72
- 110382700 INSERTO DE PRUEBA 28MM 0° 44/46MM
- 110382705 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 48/50MM
- 110382710 INSERTO DE PRUEBA 32MM 0° 52/54MM
- 110382715 INSERTO DE PRUEBA 36MM 0° 52/54MM
- 110382720 INSERTO DE PRUEBA 36MM 0° 56/58MM
- 110382725 INSERTO DE PRUEBA 36MM 0° 60/72MM
- 110382800 INSERTO DE PRUEBA 28MM 5° 44/46MM
- 110382805 INSERTO DE PRUEBA 32MM 5° 48/50MM
- 110382810 INSERTO DE PRUEBA 32MM 5° 52/54MM
- 110382815 INSERTO DE PRUEBA FIN 36MM 5° 52-54MM
- 110382820 INSERTO DE PRUEBA 36MM 5° 56/58MM
- 110382825 INSERTO DE PRUEBA 36MM 5° 60/72MM
- 110380860 CABEZA DE PRUEBA 28MM S.N.
- 110380870 CABEZA DE PRUEBA 28MM M.N.
- 110380880 CABEZA DE PRUEBA 28MM L.N.
- 110380890 CABEZA DE PRUEBA 28MM XL.N.
- 110380960 CABEZA DE PRUEBA 32MM S.N.
- 110380970 CABEZA DE PRUEBA 32MM M.N.

WMB

Sedes y Delegaciones

Tel. (454-11) 44 99-0000 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 959, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1430, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

- 110380980 CABEZA DE PRUEBA 32MM L.N.
- 110380990 CABEZA DE PRUEBA 32MM XL.N.
- 110381060 CABEZA DE PRUEBA 36MM S.N.
- 110381070 CABEZA DE PRUEBA 36MM M.N.
- 110381080 CABEZA DE PRUEBA 36MM L.N.
- 110381090 CABEZA DE PRUEBA 36MM XL.N.
- 110384044 FRESA ACETABULAR 44MM
- 110384046 FRESA ACETABULAR 46MM
- 110384048 FRESA ACETABULAR 48MM
- 110384050 FRESA ACETABULAR 50MM
- 110384052 FRESA ACETABULAR 52MM
- 110384054 FRESA ACETABULAR 54MM
- 110384056 FRESA ACETABULAR 56MM
- 110384058 FRESA ACETABULAR 58MM
- 110384060 FRESA ACETABULAR 60MM
- 110384062 FRESA ACETABULAR 62MM
- 110384113 MANGO PARA FRESAS "ZIMMER" 12'
- 110380418 SOPORTE PARA VENTOSA
- 110380419 VENTOSA PARA INSERTO
- 110381525 ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA FRESAS CÓNICAS
- 110388630 IMPACTADOR PARA POLIETILENO INTERNO CON CABEZA 28MM

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4540-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 851, CABA

Sede Aisina
Aisina 665/671, CABA

Sede INAMI
Av. Caseros 2151, CABA

Sede TNAL
Av. de San Martín 17, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Brindisi 1000,
San Martín 1000 - Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 111, km. 10
COTECAR, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Av. Coronel 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 110388636 CABEZA 32MM PARA IMPACTADOR PARA POLIETILENO
- 110388637 CABEZA 36MM PARA IMPACTADOR PARA POLIETILENO
- 110388700 CENTRADOR 3,2MM
- 110388701 CENTRADOR
- 110388730 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD
- 110388760 VARILLA FLEXIBLE CON CONECTOR "JACOBS"
- 110388771 BROCA DIÁ. 3,2MM L. 70MM
- 110388772 BROCA DIÁ. 3,2MM L. 56MM
- 110388773 Broca DIÁ. 4,5mm L. 56
- 110388800 PINZA PARA TORNILLOS
- 170010112 DESTORNILLADOR
- 340085045 DESTORNILLADOR HEXAGONAL PARA TORNILLO 4,5-6,5MM
- 200760550 PINZA PARA TORNILLOS CANULADOS
- PRÓTESIS DE VÁSTAGO FIN**
- 110380508 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO
8.0 CONO 12/14
- 110380509 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO
9.0 CONO 12/14

WMB

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54 11) 4330-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 969, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mercedita
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, Km.19,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Rocque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

110380510 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO

10.0 CONO 12/14

110380511 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO

11.0 CONO 12/14

110380512 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO

12.0 CONO 12/14

110380513 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO

13.0 CONO 12/14

110380514 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO

14.0 CONO 12/14

110380515 VÁSTAGO NO CEMENTADO FIN ROCIADO CON PLASMA TAMAÑO

15.0 CONO 12/14

110380528 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 8.0 CONO 12/14

110380529 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 9.0 CONO 12/14

110380530 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 10.0 CONO 12/14

110380531 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 11.0 CONO 12/14

110380532 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 12.0 CONO 12/14

110380533 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 13.0 CONO 12/14

110380534 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 14.0 CONO 12/14

Sedes y Delegaciones

Tel. (54-11) 53-09800 - [Url: //www.anmat.gov.ar](http://www.anmat.gov.ar) - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 850, CABA

Sede Alsina
Alsina 565/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Ruta 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada, CABA
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km 11,
COTECAR, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Ruta González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

110380535 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 15.0 CONO 12/14

110380536 VÁSTAGO CEMENTADO FIN TAMAÑO 16.0 CONO 12/14

VÁSTAGO CORTO FIN

110382608 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 8.0 CONO 12/14

110382609 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 9.0 CONO 12/14

110382610 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 10.0 CONO 12/14

110382611 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 11.0 CONO 12/14

110382612 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 12.0 CONO 12/14

110382613 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 13.0 CONO 12/14

110382614 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 14.0 CONO 12/14

110382615 VÁSTAGO CORTO CEMENTADO FIN TAMAÑO 15.0 CONO 12/14

110382508 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 8

110382509 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 9

110382510 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 10

110382511 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 11

110382512 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 12

110382513 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 13

110382514 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 14

110382515 VÁSTAGO CORTO NO CEMENTADO FIN TAMAÑO 15

Sedes y Delegaciones

Tel. +54 (0) 4342-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 535,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km. 10,
CO. TE. CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Rodrigo González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

INSTRUMENTAL PARA VÁSTAGOS FIN

110201253 MANGO PARA RASPA

110380608 RASPA DE VÁSTAGO FIN 8MM

110380609 RASPA DE VÁSTAGO FIN 9MM

110380610 RASPA DE VÁSTAGO FIN 10MM

110380611 RASPA DE VÁSTAGO FIN 11MM

110380612 RASPA DE VÁSTAGO FIN 12MM

110380613 RASPA DE VÁSTAGO FIN 13MM

110380614 RASPA DE VÁSTAGO FIN 14MM

110380615 RASPA DE VÁSTAGO FIN 15MM

110380704N BANDEJA PARA RASPAS E INSTRUMENTAL

110380705N BANDEJA PARA FRESAS E INSTRUMENTAL

110380800 IMPACTOR DE CABEZA

110380805 ADAPTADOR DE IMPACTOR DE CABEZA 28MM

110380810 ADAPTADOR DE IMPACTOR DE CABEZA 32MM

110380812 ADAPTADOR DE IMPACTOR DE CABEZA 36MM

110380820 IMPACTOR - EXTRACTOR DE VÁSTAGO

110380825 EXTRACTOR DE CABEZA

110380826 EXTRACTOR DE VÁSTAGO

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54)11 4370-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 1000, CABA

Sede Alsina
Avenida 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2171, CABA

Sede INAL
Avenida Caseros 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escobar 1000
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 111, Km. 10
CO.FE.CAP., Paso de los
Libres, Prov. de Córdoba

Deleg. Posadas
Avenida Goyabez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 110380830 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 28MM S.N
- 110380840 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 28MM M.N
- 110380850 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 28MM L.N
- 110380855 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 28MM XL.N
- 110380860 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM S.N
- 110380870 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM M.N
- 110380880 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM L.N
- 110380890 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM XL.N
- 110380930 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 32MM C.C.
- 110380940 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 32MM C.M.
- 110380950 CABEZA DE PRUEBA PARA RASPA 32MM C.L.
- 110380960 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM S.N
- 110380970 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM M.N
- 110380980 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM L.N
- 110380990 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM XL.N
- 110381060 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM S.N
- 110381070 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM M.N
- 110381080 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM L.N
- 110381090 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM XL.N

WRB

Sedes y Delegaciones

Tel: (+54-11) 4540-0000 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 859, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Merlo
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km 10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Rodríguez González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 110381010 OSTEÓTOMO PARA VÁSTAGO FIN
- 110381408 FRESA CÓNICA FIN 8,0MM-PCL 7,5MM ZIMMER
- 110381409 FRESA CÓNICA FIN 9,0MM-PCL 9,0MM ZIMMER
- 110381410 FRESA CÓNICA FIN 10,0MM-PCL 10,5MM ZIMMER
- 110381411 FRESA CÓNICA FIN 11,0MM-PCL 11,5MM-12,5MM ZIMMER
- 110381412 FRESA CÓNICA FIN 12,0MM-PCL 14,0MM ZIMMER
- 110381413 FRESA CÓNICA FIN 13,0MM-PCL 15,5MM ZIMMER
- 110381521 MANGO EN T PARA FRESA CÓNICA
- 110381520 MANDRIL RÁPIDO EN T PARA FRESA RECTA
- 110381525 MANDRIL JACOBS PARA FRESA RECTA
- 110381560 FRESA PARA CALCAR
- 110384042 FRESA ACETABULAR DIÁ. 42MM
- 110384044 FRESA ACETABULAR DIÁ. 44MM
- 110384046 FRESA ACETABULAR DIÁ. 46MM
- 110384048 FRESA ACETABULAR DIÁ. 48MM
- 110384050 Fresa acetabular DIÁ. 50mm
- 110384052 Fresa acetabular DIÁ. 52mm
- 110384054 Fresa acetabular DIÁ. 54mm
- 110384056 FRESA ACETABULAR DIÁ. 56MM

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 1249-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 880, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 21e1, CABA

Sede INAL
Emancipación 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalona de
San Martín 1000, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, Km. 10
CO. DE CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Riquelme González 1107,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 110384058 FRESA ACETABULAR DIÁ. 58MM
110384060 FRESA ACETABULAR DIÁ. 60MM
110384062 FRESA ACETABULAR DIÁ. 62MM
110384064 FRESA ACETABULAR DIÁ. 64MM
110384100 EJE UNIVERSAL AO PARA FRESA ACETABULAR
110384101 EJE UNIVERSAL AESC PARA FRESA ACETABULAR
110384102 EJE UNIVERSAL JACOBS PARA FRESA ACETABULAR
110384103 EJE UNIVERSAL ZIMMER PARA FRESA ACETABULAR
110384104 EJE UNIVERSAL HUDSON PARA FRESA ACETABULAR
110384105 EJE UNIVERSAL ZIMMER PARA FRESA AC. 9"
110384106 EJE UNIVERSAL "AO" PARA FRESA AC. 9"
110384107 EJE UNIVERSAL HURRIS PARA FRESA ACETABULAR
110384113 EJE UNIVERSAL ZIMMER PARA FRESA ACETABULAR12"
110384116 EJE UNIVERSAL "AO" PARA FRESA ACETABULAR 12"
110384120 BANDEJA PARA FRESA
INSTRUMENTAL PARA VÁSTAGO CORTO FIN
110380820 IMPACTOR-EXTRACTOR DE VÁSTAGO
110381408 FRESA CÓNICA 8MM ZIMMER
110381409 FRESA CÓNICA 9MM ZIMMER

WRB

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4330-9300 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 359, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km. 10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 110381410 FRESA CÓNICA 10MM ZIMMER
- 110381411 FRESA CÓNICA 11MM ZIMMER
- 110381412 FRESA CÓNICA 12MM ZIMMER
- 110381413 FRESA CÓNICA 13MM ZIMMER
- 110380640 IMPACTOR PARA VÁSTAGO CORTO FIN
- 110380860 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM S.N. FIN-PCL
- 110380870 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM M.N. FIN-PCL
- 110380880 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM L.N. FIN-PCL
- 110380890 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM XL.N. FIN-PCL
- 110380960 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM S.N. FIN-PCL
- 110380970 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM M.N. FIN-PCL
- 110380980 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM L.N. FIN-PCL
- 110380990 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM XL.N. FIN-PCL
- 110381060 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM S.N. FIN-PCL
- 110381070 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM M.N. FIN-PCL
- 110381080 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM L.N. FIN-PCL
- 110381090 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM XL.N. FIN-PCL
- 110381011 OSTEÓTOMO PARA VÁSTAGO PEQUEÑO
- 110380800 IMPACTOR DE CABEZAS

MPS

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 849, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, Córdoba

Sede INAL
Consejo Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalón, de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.100
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Autos González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 110380805 ADAPTADOR PARA IMPACTOR DE CABEZAS 28MM
- 110380810 ADAPTADOR PARA IMPACTOR DE CABEZAS 32MM
- 110380812 ADAPTADOR PARA IMPACTOR DE CABEZAS 36MM
- 110381521 MANGO EN T ZIMMER
- 110381525 ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA FRESAS CÓNICAS
- 110381560 FRESAS PARA CALCAR
- 110201253 MANGO PARA RASPA
- 110201255 ADAPTADOR DE MANGO DEL ESCARIADOR DE VÁSTAGO FIN
- 110201250 MANGO PARA RASPA
- 110380628 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 8MM
- 110380629 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 9MM
- 110380630 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 10MM
- 110380631 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 11MM
- 110380632 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 12MM
- 110380633 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 13MM
- 110380634 RASPA PARA VÁSTAGO CORTO FIN 14MM
- 110380620 ADAPTADOR PARA FIN
- 110380704N BANDEJA PARA RASPA E INSTRUMENTAL
- 110380705N BANDEJA PARA FRESA E INSTRUMENTAL

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4540-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 859, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Rocque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

VÁSTAGO MODULAR PARA REVISIÓN DE CADERA - SMR

120362540 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 125° L. 40MM

120362550 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 125° L. 50MM

120362560 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 125° L. 60MM

120362570 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 125° L. 70MM

120363540 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 135° L. 40MM

120363550 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 135° L. 50MM

120363560 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 135° L. 60MM

120363570 COMPONENTE PROXIMAL "SMR" 135° L. 70MM

120372540 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 125° L. 40MM

120372550 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 125° L. 50MM

120372560 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 125° L. 60MM

120372570 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 125° L. 70MM

120373540 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 135° L. 40MM

120373550 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 135° L. 50MM

120373560 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 135° L. 60MM

120373570 COMPONENTE PROXIMAL DE RELLENO "SMR" 135° L. 70MM

120373914 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 14MM

120373915 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 15MM

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4540-9800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 849, T-12

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAMI

Av. Caseros 116, CABA

Sede INAL

Av. San Martín 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Barridos de Brea 1000
San Martín 1000, T-12
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km. 4
CO. DE CAS, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Ruta Nacional 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

120373916 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 16MM
120373917 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 17MM
120373918 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 18MM
120373919 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 19MM
120373920 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 20MM
120373921 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 21MM
120373922 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 22MM
120373924 COMPONENTE DISTAL "SMR" 100MM DIÁ. 24MM
120374014 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 14MM
120374015 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 15MM
120374016 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 16MM
120374017 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 17MM
120374018 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 18MM
120374019 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 19MM
120374020 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 20MM
120374021 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 21MM
120374022 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 22MM
120374024 COMPONENTE DISTAL "SMR" 160MM DIÁ. 24MM
120375014 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 14MM

WMS

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4540-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 959, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, Km 10
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Rogue González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 120375015 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 15MM
- 120375016 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 16MM
- 120375017 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 17MM
- 120375018 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 18MM
- 120375019 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 19MM
- 120375020 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 20MM
- 120375021 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 21MM
- 120375022 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 22MM
- 120375024 COMPONENTE DISTAL "SMR" 200MM DIÁ. 24MM
- 120376014 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 14MM
- 120376015 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 15MM
- 120376016 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 16MM
- 120376017 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 17MM
- 120376018 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 18MM
- 120376019 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 19MM
- 120376020 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 20MM
- 120376021 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 21MM
- 120376022 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 22MM
- 120376024 COMPONENTE DISTAL "SMR" 240MM DIÁ. 24MM

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4709-0600 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 316, CABA

Sede INAL
Barracas Unidas 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escobar 117 de
San Martín 1800, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, Km. 17,
CO.TE.CAR, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Avenida González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

120376140 TORNILLO DE BLOQUEO "SMR" TAMAÑO 40

120376150 TORNILLO DE BLOQUEO "SMR" TAMAÑO 50

120376160 TORNILLO DE BLOQUEO "SMR" TAMAÑO 60

120376170 TORNILLO DE BLOQUEO "SMR" TAMAÑO 70

INSTRUMENTAL PARA SMR

120540040 TORNILLO DE BLOQUEO PARA COMPONENTE PROXIMAL DE
PRUEBA L. 40MM

120540050 TORNILLO DE BLOQUEO PARA COMPONENTE PROXIMAL DE
PRUEBA L. 50MM

120540060 TORNILLO DE BLOQUEO PARA COMPONENTE PROXIMAL DE
PRUEBA L. 60MM

120540070 TORNILLO DE BLOQUEO PARA COMPONENTE PROXIMAL DE
PRUEBA L. 70MM

120540140 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 125° L. 40MM

120540150 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 125° L. 50MM

120540160 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 125° L. 60MM

120540170 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 125° L. 70MM

120540240 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 135° L. 40MM

120540250 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 135° L. 50MM

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 359, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, Km 10,
CO. TE. CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Rocque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

120540260 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 135° L. 60MM

120540270 COMPONENTE PROXIMAL DE PRUEBA 135° L. 70MM

110380860 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM S.N.

110380870 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM M.N.

110380880 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM L.N.

110380890 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM XL.N.

110380960 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM S.N. FIN-PCL

110380970 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM M.N. FIN-PCL

110380980 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM L.N. FIN-PCL

110380990 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM XL.N. FIN-PCL

110381060 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM S.N. FIN-PCL

110381070 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM M.N. FIN-PCL

110381080 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM L.N. FIN-PCL

110381090 CABEZAS DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM XL.N. FIN-PCL

110381525 ACOPLÉ RÁPIDO PARA FRESAS CÓNICAS

110381521 MANGO EN T ZIMMER

120540514 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 14MM

120540515 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 15MM

120540516 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 16MM

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4760-0800 - <http://www.anmat.gob.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 106, CABA

Sede Alsina
Avenida Alsina 1601, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede IPAL
Barridos Unidos 100, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km 19,
COLECAER, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

120540517 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 17MM
120540518 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 18MM
120540519 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 19MM
120540520 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 20MM
120540521 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 21MM
120540522 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 22MM
120540524 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 24MM
120540714 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 14MM L.100
120540715 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 15MM L.100
120540716 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 16MM L.100
120540717 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 17MM L.100
120540718 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 18MM L.100
120540719 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 19MM L.100
120540720 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 20MM L.100
120540721 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 21MM L.100
120540722 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 22MM L.100
120540724 FRESA CÓNICA ZIMMER DIA 24MM L.100
120540395 GUÍA PARA COMPONENTE PROXIMAL
120540400 FRESA TUBULAR

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/571, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 120540405 DESTORNILLADOR HEXAGONAL
- 120540409 LLAVE PARA INSERTADOR DE COMPONENTE DISTAL
- 120540410 INSERTADOR PARA COMPONENTE DISTAL
- 120540411 IMPACTADOR PARA COMPONENTE PROXIMAL
- 120540412 EJE NO ROTATORIO
- 120540415 EJE GUÍA PARA FRESA TUBULAR
- 120540420 EXTRACTOR PARA COMPONENTE PROXIMAL
- 110384110 MANGO EN T "AO" PARA FRESA
- 120540630 ADAPTADOR JACOB PARA FRESAS AO
- 120540650 BANDEJA DE INSTRUMENTAL SUPERIOR
- 120540651 BANDEJA DE INSTRUMENTAL INFERIOR

VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS

- 120410101 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 1
- 120410102 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 2
- 120410103 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 3
- 120410104 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 4
- 120410105 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 5
- 120410106 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 6

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54) 11 4319-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1430, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117 Km.10
CO. TE. CAB., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Avenida Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 120410107 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 7
- 120410108 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 8
- 120410109 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 135° CON HA TAMAÑO 9
- 120410201 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 1
- 120410202 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 2
- 120410203 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 3
- 120410204 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 4
- 120410205 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 5
- 120410206 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 6
- 120410207 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 7
- 120410208 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 8
- 120410209 VÁSTAGO NO CEMENTADO KORUS 125° CON HA TAMAÑO 9

VÁSTAGO CEMENTADO KORUS

- 120430001 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 1
- 120430002 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 2
- 120430003 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 3
- 120430004 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 4
- 120430005 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 5
- 120430006 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 6

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4740-9800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 860, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km. 10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Fuque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 120430007 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 7
- 120430008 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 8
- 120430009 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° TAMAÑO 9
- 120430011 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 1
- 120430012 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 2
- 120430013 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 3
- 120430014 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 4
- 120430015 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 5
- 120430016 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 6
- 120430017 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 7
- 120430018 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 8
- 120430019 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 9
- 120430021 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL
TAMAÑO 1
- 120430022 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL
TAMAÑO 2
- 120430023 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL
TAMAÑO 3

120430024 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL

TAMAÑO 4

120430025 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL

TAMAÑO 5

120430026 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL

TAMAÑO 6

120430027 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL

TAMAÑO 7

120430028 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL

TAMAÑO 8

120430029 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 135° CON PUNTA DISTAL

TAMAÑO 9

120430031 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 1 CON CENTRADOR

DISTAL

120430032 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 2 CON CENTRADOR

DISTAL

120430033 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 3 CON CENTRADOR

DISTAL

WMP

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

120430034 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 4 CON CENTRADOR

DISTAL

120430035 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 5 CON CENTRADOR

DISTAL

120430036 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 6 CON CENTRADOR

DISTAL

120430037 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 7 CON CENTRADOR

DISTAL

120430038 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 8 CON CENTRADOR

DISTAL

120430039 VÁSTAGO CEMENTADO KORUS 125° TAMAÑO 9 CON CENTRADOR

DISTAL

VÁSTAGO MODULAR KORUS

120410602 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 2

120410603 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 3

120410604 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 4

120410605 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 5

120410606 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 6

120410607 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 7

120410608 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 8

120410609 VÁSTAGO MODULAR KORUS CON HA TAMAÑO 9

120420001 CUELLO CORTO ESTÁNDAR TAMAÑO CORTO

120420002 CUELLO LARGO ESTÁNDAR TAMAÑO LARGO

120420011 CUELLO CORTO VARO/VALGO 8° CORTO

120420012 CUELLO LARGO VARO/VALGO 8° LARGO

120420021 CUELLO CORTO VARO/VALGO 15° CORTO

120420022 CUELLO LARGO VARO/VALGO 15° LARGO

120420031 CUELLO CORTO ANTE/RETRO 8° CORTO

120420032 CUELLO LARGO ANTE/RETRO 8° LARGO

120420041 CUELLO CORTO ANTE/RETRO 14° CORTO

120420042 CUELLO LARGO ANTE/RETRO 14° LARGO

120420051 CUELLO CORTO DE CRCO A/R 5° - V/V 6°

120420052 CUELLO LARGO DE CRCO A/R 5° - V/V 6°

120420061 CUELLO CORTO DE CRCO A/R 5° - V/V 6°

120420062 CUELLO LARGO DE CRCO A/R 5° - V/V 6°

INSTRUMENTAL PARA VÁSTAGO KORUS

120410101R RASPA KORUS TAMAÑO 1

120410102R RASPA KORUS TAMAÑO 2

WMB

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 269, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km 19,
CO.FE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Nogue González 1137,
Posadas - Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 120410103R RASPA KORUS TAMAÑO 3
- 120410104R RASPA KORUS TAMAÑO 4
- 120410105R RASPA KORUS TAMAÑO 5
- 120410106R RASPA KORUS TAMAÑO 6
- 120410107R RASPA KORUS TAMAÑO 7
- 120410108R RASPA KORUS TAMAÑO 8
- 120410109R RASPA KORUS TAMAÑO 9
- 120411100 MANGO PARA RASPA KORUS
- 120411105 IMPACTOR PARA VÁSTAGO KORUS
- 120411104 LLAVE ALLEN 5MM
- 120380122 IMPACTOR PARA VÁSTAGO
- 120411106 ADAPTADOR PARA CABEZAS DE PRUEBA 135°
- 120411107 ADAPTADOR PARA CABEZAS DE PRUEBA 125°
- 110381010 OSTEÓTOMO
- 110381011 OSTEÓTOMO PARA VÁSTAGO PEQUEÑO
- 110381400 FRESA MONOBLOQUE
- 110380860 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM S.N
- 110380870 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM M.N
- 110380880 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM L.N

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4316-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 565/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Urquiza 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escobar de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117 Km. 19
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Bosque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 110380890 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 28MM XL.N
- 110380960 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM S.N
- 110380970 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM M.N
- 110380980 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM L.N
- 110380990 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 32MM XL.N
- 110381060 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM S.N
- 110381070 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM M.N
- 110381080 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM L.N
- 110381090 CABEZA DE PRUEBA PARA VÁSTAGO 36MM XL.N
- 110380800 IMPACTOR DE CABEZA
- 110380805 ADAPTADOR DE IMPACTOR DE CABEZA 28MM
- 110380810 ADAPTADOR DE IMPACTOR DE CABEZA 32MM
- 110380812 ADAPTADOR DE IMPACTOR DE CABEZA 36MM
- 110380820 IMPACTOR - EXTRACTOR DE VÁSTAGO
- 120411130 NUEVA BANDEJA KORUS
- 120411120 BANDEJA SUPERIOR PARA ESCARIADOR
- 120411125 RECIPIENTE PARA INSTRUMENTAL
- 120411101 MANGO PARA RASPA KORUS OFFSET DERECHO
- 120411102 MANGO PARA RASPA KORUS OFFSET IZQUIERDO

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalante de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km 17
CO. TE. CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Soque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

120411103 ACCESORIO DE ACOPLAMIENTO PARA RASPA KORUS

120411108 IMPACTOR PARA VÁSTAGO KORUS

INSTRUMENTAL PARA VÁSTAGO MODULAR KORUS

120421001 CUELLO DE PRUEBA CORTO

120421002 CUELLO DE PRUEBA LARGO

120421011 CUELLO DE PRUEBA CORTO VARO/VALGO 8°

120421012 CUELLO DE PRUEBA LARGO VARO/VALGO 8°

120421021 CUELLO DE PRUEBA CORTO VARO/VALGO 15°

120421022 CUELLO DE PRUEBA LARGO VARO/VALGO 15°

120421031 CUELLO DE PRUEBA CORTO ANTE/RETRO 8°

120421032 CUELLO DE PRUEBA LARGO ANTE/RETRO 8°

120421041 CUELLO DE PRUEBA CORTO ANTE/RETRO 14°

120421042 CUELLO DE PRUEBA LARGO ANTE/RETRO 14°

120421051 CUELLO DE PRUEBA CORTO ANTE 5°/VALGO 6° DERECHO;

CUELLO DE PRUEBA CORTO RETRO 5°/VARO 6° DERECHO; CUELLO DE

PRUEBA CORTO ANTE 5°/VARO 6° IZQUIERDO; CUELLO DE PRUEBA CORTO

RETRO 5°/VALGO 6° IZQUIERDO

120421052 CUELLO DE PRUEBA LARGO ANTE 5°/VALGO 6° DERECHO;

CUELLO DE PRUEBA LARGO RETRO 5°/VARO 6° DERECHO; CUELLO DE



PRUEBA LARGO ANTE 5°/VARO 6° IZQUIERDO; CUELLO DE PRUEBA LARGO

RETRO 5°/VALGO 6° IZQUIERDO

120421061 CUELLO DE PRUEBA CORTO ANTE 5°/VALGO 6° IZQUIERDO;

CUELLO DE PRUEBA CORTO RETRO 5°/VARO 6° IZQUIERDO; CUELLO DE

PRUEBA CORTO ANTE 5°/VARO 6° DERECHO; CUELLO DE PRUEBA CORTO

RETRO 5°/VALGO 6° DERECHO

120421062 CUELLO DE PRUEBA LARGO ANTE 5°/VALGO 6° IZQUIERDO;

CUELLO DE PRUEBA LARGO RETRO 5°/VARO 6° IZQUIERDO; CUELLO DE

PRUEBA LARGO ANTE 5°/VARO 6° DERECHO; CUELLO DE PRUEBA LARGO

RETRO 5°/VALGO 6° DERECHO

120421100 EXTRACTOR DE VÁSTAGO MODULAR KORUS

120421105 IMPACTOR DE VÁSTAGO MODULAR KORUS

120421107 IMPACTOR DE CONO DE CUELLO MODULAR KORUS

120421000 MARCO PARA CUELLOS DE PRUEBA

Período de vida útil:

Sistema: 10 años.

Instrumental: no aplica.

Método de Esterilización:

Componentes metálicos y cerámicos: Radiación Beta o Gamma.

Insertos: ETO

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-9800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 369, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

Forma de presentación: Unitaria.

Condición de uso: Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del Fabricante: GRUPPO BIOIMPIANTI S.r.l

Lugar/es de elaboración: Via Liguria 28 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Italia.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-1029-76,
con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición
autorizante.

Expediente Nº 1-47-3110-1831-18-3

Disposición Nº

372

14 ENE 2019

Dr. Waldo Belloso
Subadministrador Nacional
ANMAT

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 565/571, CABA

Sede INAME
Av. Corrientes 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalera de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10
CO. FE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Riquelme González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé