



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 0984

BUENOS AIRES, 16 FEB 2012

VISTO el Expediente N° 1-47-19705-11-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones OSTEOLIFE S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 0984

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

**EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca/s INTEGRAL®®, LOGIC®®, GENERIC®®, NATURE®®, EQUATEUR®®, HORIZON®®, DELTA®®, SATURNE®®, ACOR®®, INITIALE®®, LUNA®®, EXTREME®®, OPTIMAL®®, AMPLIVISION®®, nombre descriptivo SISTEMA DE PRÓTESIS TOTAL DE CADERA E INSTRUMENTAL y nombre técnico PRÓTESIS DE ARTICULACIÓN PARA CADERA, TOTALES, de acuerdo a lo solicitado por OSTEOLIFE S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 317 a 354 y 356 a 360 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-940-106, con exclusión de



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

DISPOSICIÓN N° 0984

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-19705-11-1

DISPOSICIÓN N° 0984


Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°**0984**.....

Nombre descriptivo: SISTEMA DE PRÓTESIS TOTAL DE CADERA E INSTRUMENTAL.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-150 – PRÓTESIS DE ARTICULACIÓN PARA CADERA, TOTALES.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): INTEGRALE®, LOGIC®, GENERIC®, NATURE®, EQUATEUR®, HORIZON®, DELTA®, SATURNE®, ACOR®, INITIALE®, LUNA®, EXTREME®, OPTIMAL®, AMPLIVISION®.

Clase de Riesgo: Clase III.

Indicación/es autorizada/s: Afecciones de la articulación de la cadera debidas a una enfermedad degenerativa o congénita, inflamatoria o postraumática. Secuelas de intervenciones anteriores, Prótesis total de Cadera, Osteotomía.

Modelo/s: 1-0100101 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 1

1-0100102 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 2

1-0100103 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 3

1-0100104 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 4

1-0100105 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 5

1-0100106 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 6

1-0100107 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 7

1-0100108 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 8

1-0101701 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial – sin cemento Talle 1

1-0101702 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial – sin cemento Talle 2

1-0101703 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial – sin cemento Talle 3

1-0101704 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial – sin cemento Talle 4

1-0101705 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial – sin cemento Talle 5

1-0101706 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial – sin cemento Talle 6



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0101707 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial – sin cemento Talle 7
- 1-0100201 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 1
- 1-0100202 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 2
- 1-0100203 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 3
- 1-0100204 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 4
- 1-0100205 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 5
- 1-0100206 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 6
- 1-0100207 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 7
- 1-0101301 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 1
- 1-0101302 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 2
- 1-0101303 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 3
- 1-0101304 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 4
- 1-0101305 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 5
- 1-0101306 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 6
- 1-0101307 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 7
- 1-0100540 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talla 40mm
- 1-0100542 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 42mm
- 1-0100544 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 44mm
- 1-0100546 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 46mm
- 1-0100548 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 48mm
- 1-0100550 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 50mm
- 1-0100552 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 52mm
- 1-0100554 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 54mm
- 1-0100556 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 56mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0100558 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 58mm
- 1-0100560 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 60mm
- 1-0100562 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 62mm
- 1-0100564 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 64mm
- 1-0100640 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talle 40mm
- 1-0100642 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 42mm
- 1-0100644 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 44mm
- 1-0100646 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 46mm
- 1-0100648 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 48mm
- 1-0100650 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 50mm
- 1-0100652 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 52mm
- 1-0100654 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 54mm
- 1-0100656 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 56mm
- 1-0100658 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 58mm
- 1-0100660 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 60mm
- 1-0100662 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 62mm
- 1-0100664 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 64mm
- 5-0100200 Tornillo obturador de fondo de cúpula
- 1-0100740 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 40/22
- 1-0100742 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 42/22
- 1-0100744 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 44/22
- 1-0100746 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 46/22
- 1-0100748 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 48/22
- 1-0100750 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 50/22
- 1-0100752 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 52/22
- 1-0100754 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 54/22
- 1-0100756 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 56/22
- 1-0100758 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 58/22
- 1-0100760 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 60/22
- 1-0100762 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 62/22
- 1-0100764 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 64/22

5



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0100848 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 48/28
1-0100850 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 50/28
1-0100852 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 52/28
1-0100854 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 54/28
1-0100856 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 56/28
1-0100858 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 58/28
1-0100860 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 60/28
1-0100862 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 62/28
1-0100864 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 64/28
1-0100952 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 52/32
1-0100954 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 54/32
1-0100956 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 56/32
1-0100958 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 58/32
1-0100960 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 60/32
1-0100962 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 62/32
1-0100964 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 64/32
1-0101040 Inserto con reborde para Cotilo Talle 40/22
1-0101042 Inserto con reborde para Cotilo Talle 42/22
1-0101044 Inserto con reborde para Cotilo Talle 44/22
1-0101046 Inserto con reborde para Cotilo Talle 46/22
1-0101048 Inserto con reborde para Cotilo Talle 48/22
1-0101050 Inserto con reborde para Cotilo Talle 50/22
1-0101052 Inserto con reborde para Cotilo Talle 52/22
1-0101054 Inserto con reborde para Cotilo Talle 54/22
1-0101056 Inserto con reborde para Cotilo Talle 56/22
1-0101058 Inserto con reborde para Cotilo Talle 58/22
1-0101060 Inserto con reborde para Cotilo Talle 60/22
1-0101062 Inserto con reborde para Cotilo Talle 62/22
1-0101064 Inserto con reborde para Cotilo Talle 64/22
1-0101548 Inserto con reborde para Cotilo Talle 48/28
1-0101550 Inserto con reborde para Cotilo Talle 50/28

5,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0101552 Inserto con reborde para Cotilo Talle 52/28
- 1-0101554 Inserto con reborde para Cotilo Talle 54/28
- 1-0101556 Inserto con reborde para Cotilo Talle 56/28
- 1-0101558 Inserto con reborde para Cotilo Talle 58/28
- 1-0101560 Inserto con reborde para Cotilo Talle 60/28
- 1-0101562 Inserto con reborde para Cotilo Talle 62/28
- 1-0101564 Inserto con reborde para Cotilo Talle 64/28
- 1-0101252 Inserto con reborde para Cotilo Talle 52/32
- 1-0101254 Inserto con reborde para Cotilo Talle 54/32
- 1-0101256 Inserto con reborde para Cotilo Talle 56/32
- 1-0101258 Inserto con reborde para Cotilo Talle 58/32
- 1-0101260 Inserto con reborde para Cotilo Talle 60/32
- 1-0101262 Inserto con reborde para Cotilo Talle 62/32
- 1-0101264 Inserto con reborde para Cotilo Talle 64/32
- 1-0101616 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 16 mm
- 1-0101620 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 20 mm
- 1-0101625 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 25 mm
- 1-0101630 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 30 mm
- 1-0101635 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 35 mm
- 1-0101640 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 40 mm
- 1-0101645 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 45 mm
- 1-0101650 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 50 mm
- 1-0101655 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 55 mm
- 1-0101660 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 60 mm
- 1-0101665 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 65 mm
- 1-0101838 Obturador diafisario
- 1-0101101 Cabeza femoral M30NW Ø 22.2 Cuello corto
- 1-0101102 Cabeza femoral M30NW Ø 22.2 Cuello mediano
- 1-0101103 Cabeza femoral M30NW Ø 22.2 Cuello largo
- 1-0101111 Cabeza femoral M30NW Ø 28 Cuello corto
- 1-0101112 Cabeza femoral M30NW Ø 28 Cuello mediano



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0101113 Cabeza femoral M30NW Ø 28 Cuello largo

1-0101114 Cabeza femoral M30NW Ø 28 Cuello extra largo

1-0101121 Cabeza femoral M30NW Ø 32 Cuello corto

1-0101122 Cabeza femoral M30NW Ø 32 Cuello mediano

1-0101123 Cabeza femoral M30NW Ø 32 Cuello largo

1-0101124 Cabeza femoral M30NW Ø 32 Cuello extra largo

1-0101131 Cabeza femoral M30NW Ø 26 Cuello corto

1-0101132 Cabeza femoral M30NW Ø 26 Cuello mediano

1-0101133 Cabeza femoral M30NW Ø 26 Cuello largo

1-0190701 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 22.2 Cuello corto

1-0190702 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 22.2 Cuello mediano

1-0190703 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 22.2 Cuello largo

1-0190711 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 28 Cuello corto

1-0190712 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 28 Cuello mediano

1-0190713 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 28 Cuello largo

1-0190714 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 28 Cuello extra largo

1-0190721 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 32 Cuello corto

1-0190722 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 32 Cuello mediano

07 1-0190723 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 32 Cuello largo

1-0190724 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 32 Cuello extra largo

1-0102248 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 48 para inserto cerámico

1-0102250 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 50 para inserto cerámico

1-0102252 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 52 para inserto cerámico

1-0102254 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 54 para inserto cerámico

1-0102256 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 56 para inserto cerámico



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0102258 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 58 para inserto cerámico

1-0102260 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 60 para inserto cerámico

1-0102262 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 62 para inserto cerámico

1-0102264 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 64 para inserto cerámico

1-0102301 Inserto cerámico 36/28 para Cotilo Talle 48/28

1-0102302 Inserto cerámico 39/28 para Cotilo Talle 50/28 y 52/28

1-0102303 Inserto cerámico 41/28 para Cotilo Talle 54/28

1-0102304 Inserto cerámico 44/28 para Cotilo Talle 56 y 58/28

1-0102305 Inserto cerámico 48/28 para Cotilo Talle 60/28 y 62/28

1-0102306 Inserto cerámico 52/28 para Cotilo Talle 64/28

1-0102400 Inserto cerámico 39/32 para Cotilo Talle 50/32 y 52/32

1-0102401 Inserto cerámico 41/32 para Cotilo Talle 54/32

1-0102402 Inserto cerámico 44/32 para Cotilo Talle 56/32 y 58/32

1-0102403 Inserto cerámico 48/32 para Cotilo Talle 60/32 y 62/32

1-0102404 Inserto cerámico 52/32 para Cotilo Talle 64/32

1-0106900 Inserto cerámico 44/36 para Cotilo Talle 56/36 y 58/36

1-0106901 Inserto cerámico 48/36 para Cotilo Talle 60/36 y 62/36

1-0106902 Inserto cerámico 52/36 para Cotilo Talle 64/36

1-0102711 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 28 mm
Cuello corto

1-0102712 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 28 mm
Cuello mediano

1-0102713 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 28 mm
Cuello largo

1-0102721 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 32 mm
Cuello corto

U



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0102722 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 32 mm
Cuello mediano

1-0102723 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 32 mm
Cuello largo

1-0102731 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 36 mm
Cuello corto

1-0102732 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 36 mm
Cuello mediano

1-0102733 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 36 mm
Cuello largo

1-0190811 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 28 mm Cuello corto

1-0190812 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 28 mm Cuello mediano

1-0190813 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 28 mm Cuello largo

1-0190821 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 32 mm Cuello corto

1-0190822 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 32 mm Cuello mediano

1-0190823 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 32 mm Cuello largo

1-0190831 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 36 mm Cuello corto

1-0190832 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 36 mm Cuello mediano

1-0190833 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 36 mm Cuello largo

1-0190911 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 28 mm Cuello corto

1-0190912 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 28 mm Cuello mediano

1-0190913 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 28 mm Cuello largo

1-0190921 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 32 mm Cuello corto

1-0190922 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 32 mm Cuello mediano

1-0190923 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 32 mm Cuello largo

1-0190924 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 32 mm Cuello extra largo

1-0190931 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 36 mm Cuello corto

1-0190932 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 36 mm Cuello mediano

1-0190933 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 36 mm Cuello largo

1-0190934 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 36 mm Cuello extra largo

1-0103444 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 44



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0103446 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 46
- 1-0103448 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 48
- 1-0103450 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 50
- 1-0103452 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 52
- 1-0103454 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 54
- 1-0103456 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 56
- 1-0103458 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 58
- 1-0103460 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 60
- 1-0103462 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 62
- 1-0103464 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 64
- 1-0103350 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 50
- 1-0103352 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 52
- 1-0103354 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 54
- 1-0103356 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 56
- 1-0103358 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 58
- 1-0103360 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 60
- 1-0103362 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 62
- 1-0103364 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 64
- 1-0103366 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 66
- 1-0106244 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 44
- 1-0106246 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 46
- 1-0106248 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 48



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0106250 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 50
1-0106252 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 52
1-0106254 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 54
1-0106256 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 56
1-0106258 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 58
1-0106260 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 60
1-0106262 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 62
1-0103644 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 44/22
1-0103646 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 46/22
1-0103648 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 48/22
1-0103650 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 50/22
1-0103652 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 52/22
1-0103654 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 54/22
1-0103656 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 56/22
1-0103658 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 58/22
1-0103660 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 60/22
1-0103662 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 62/22
1-0103664 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 64/22
1-0103666 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 66/22
0-0103748 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 48/2/
0-0103750 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 50/28
0-0103752 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 52/28
0-0103754 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 54/28
0-0103756 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 56/28
0-0103758 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 58/28
0-0103760 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 60/28
0-0103762 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 62/28
0-0103764 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 64/28
0-0103766 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 66/28
1-01066D1 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 1 derecho



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-01066D2 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 2 derecho

1-01066D3 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 3 derecho

1-01066D4 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 4 derecho

1-01066D5 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 5 derecho

1-01066D6 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 6 derecho

1-01066D7 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 7 derecho

1-01066G1 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 1 izquierdo

1-01066G2 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 2 izquierdo

1-01066G3 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 3 izquierdo

1-01066G4 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 4 izquierdo

1-01066G5 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 5 izquierdo

1-01066G6 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 6 izquierdo

1-01066G7 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 7 izquierdo

0-01070D1 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 1 derecho

0-01070D2 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 2 derecho



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

0-01070D3 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 3 derecho

0-01070D4 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 4 derecho

0-01070D5 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 5 derecho

0-01070D6 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 6 derecho

0-01070D7 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 7 derecho

0-01070G1 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 1 izquierdo

0-01070G2 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 2 izquierdo

0-01070G3 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 3 izquierdo

0-01070G4 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 4 izquierdo

0-01070G5 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 5 izquierdo

0-01070G6 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 6 izquierdo

0-01070G7 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 7 izquierdo

1-0106701 Cuello modular Lateral / Medial 10/12

1-0106702 Cuello modular Anterior / Retraído 8° 10/12

1-0106703 Cuello modular Lateral plus / Medial plus 10/12

1-0106704 Cuello modular Lateral / Medial 10/12 + 10.5

1-0106705 Cuello modular Lateral / Medial 10/12 + 7

1-0107101 Cuello modular Lateral / Medial 12/14

1-0107102 Cuello modular Lateral plus / Medial plus 12/14



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0107103 Cuello modular Anterior / Retraído 8° 12/14
1-0107104 Cuello modular Lateral / Medial 12/14 + 10.5
1-0191001 Cuello modular Lateral / Medial 12/14
1-0191002 Cuello modular Lateral plus / Medial plus 12/14
1-0191003 Cuello modular Anterior / Retraído 8° 12/14
1-0191004 Cuello modular Lateral / Medial 12/14 + 10.5
1-0106502 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle 2
1-0106503 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle 3
1-0106504 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle 4
1-0106505 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle 5
1-0106506 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle 6
1-0106507 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle 7
1-0190101 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 101S
1-0190102 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 102S
1-0190201 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 201S
1-0190202 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 202S
1-0190203 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 203S
1-0190301 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 301S
1-0190302 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 302S
1-0190303 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 303S
1-0190401 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 401S
1-0190402 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 402S
1-0190403 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 403S
1-0190501 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 501S
1-0190502 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 502S
1-0190601 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 601S
1-0190602 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 602S
1-0180102 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 101S
1-0180102 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 102S
1-0180201 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 201S
1-0180202 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 202S



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0180203 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 203S

1-0180301 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 301S

1-0180302 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 302S

1-0180303 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 303S

1-0180401 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 401S

1-0180402 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 402S

1-0180403 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 403S

1-0180501 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 501S

1-0180502 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 502S

1-0180601 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 601S

1-0180602 Prótesis femoral INITIALE® N° 602S

1-0104800 Cabeza Femoral INITIALE® -3

1-0104801 Cabeza Femoral INITIALE® 0

1-0104802 Cabeza Femoral INITIALE® +4

1-0150121 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 121 D

1-0150221 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 221 D

1-0150321 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 321 D

1-0150421 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 421 D

1-0150521 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 521 D

1-0150511 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 511 D

1-0150531 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 531 D

1-0140121 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 121 D

1-0140221 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 221 D

1-0140321 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 321 D

1-0140421 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 421 D

1-0140521 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 521 D

1-0170220 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 202 Ig.
200 mm

1-0170225 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 202 Ig.
250 mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0170230 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 202 Ig.
300 mm
- 1-0170235 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 202 Ig.
350 mm
- 1-0170320 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 302 Ig.
200 mm
- 1-0170325 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 302 Ig.
250 mm
- 1-0170330 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 302 Ig.
300 mm
- 1-0170335 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 302 Ig.
350 mm
- 1-0170420 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 402 Ig.
200 mm
- 1-0170425 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 402 Ig.
250 mm
- 1-0170430 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 402 Ig.
300 mm
- 1-0170435 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 402 Ig.
350 mm
- 1-0170520 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 501 Ig.
200 mm
- 1-0170525 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 501 Ig.
250 mm
- 1-0170530 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 501 Ig.
300 mm
- 1-0170535 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 501 Ig.
350 mm
- 1-0160220 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 202 Ig. 200
mm

5,



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0160225 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 202 Ig. 250 mm

1-0160230 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 202 Ig. 300 mm

1-0160235 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 202 Ig. 350 mm

1-0160320 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 302 Ig. 200 mm

1-0160325 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 302 Ig. 250 mm

1-0160330 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 302 Ig. 300 mm

1-0160335 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 302 Ig. 350 mm

1-0160420 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 402 Ig. 200 mm

1-0160425 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 402 Ig. 250 mm

1-0160430 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 402 Ig. 300 mm

1-0160435 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 402 Ig. 350 mm

1-0160520 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 501 Ig. 200 mm

1-0160525 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 501 Ig. 250 mm

1-0160530 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 501 Ig. 300 mm

1-0160535 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 501 Ig. 350 mm

1-0105440 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/37/40



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0105442 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/38.5/42
- 1-0105444 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/40/44
- 1-0105446 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/41.5/46
- 1-0105448 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/43/48
- 1-0105450 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/44.5/50
- 1-0105452 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/46/52
- 1-0105454 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/47.5/54
- 1-0105456 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/49/56
- 1-0105458 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/51/58
- 1-0105460 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2 /53/60
- 1-0104748 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/43/48
- 1-0104750 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/44.5/50
- 1-0104752 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/46/52
- 1-0104754 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/47.5/54
- 1-0104756 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/49/56
- 1-0104758 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/51/58
- 1-0104760 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/53/60
- 1-0101940 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 40/22
- 1-0101942 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 42/22
- 1-0101944 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 44/22
- 1-0101946 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 46/22
- 1-0101948 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 48/22
- 1-0101950 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 50/22
- 1-0101952 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 52/22



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0101954 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 54/22

1-0101956 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 56/22

1-0101958 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 58/22

1-0101960 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 60/22

1-0101962 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 62/22

1-0101964 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 64/22

1-0102044 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 44/28

1-0102046 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 46/28

1-0102048 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 48/28

1-0102050 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 50/28

0,

1-0102052 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 52/28

1-0102054 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 54/28

1-0102056 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 56/28

1-0102058 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 58/28

1-0102060 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 60/28



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0102062 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 62/28

1-0102064 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 64/28

1-0102148 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 48/32

1-0102150 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 50/32

1-0102152 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 52/32

1-0102154 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 54/32

1-0102156 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 56/32

1-0102158 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 58/32

1-0102160 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 60/32

1-0102162 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 62/32

U,

1-0102164 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 64/32

1-0102840 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 40/22

1-0102842 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 42/22

1-0102844 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 44/22

1-0102846 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 46/22



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0102848 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 48/22

1-0102850 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 50/22

1-0102852 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 52/22

1-0102854 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 54/22

1-0102856 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 56/22

1-0102858 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 58/22

1-0102860 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 60/22

1-0102862 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 62/22

1-0102864 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 64/22

1-0102944 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 44/28

1-0102946 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 46/28

1-0102948 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 48/28

1-0102950 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 50/28

1-0102952 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 52/28

1-0102954 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 54/28



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0102956 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 56/28

1-0102958 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 58/28

1-0102960 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 60/28

1-0102962 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 62/28

1-0102964 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 64/28

1-0103048 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 48/32

1-0103050 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 50/32

1-0103052 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 52/32

1-0103054 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 54/32

1-0103056 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 56/32

1-0103058 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 58/32

1-0103060 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 60/32

1-0103062 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 62/32

1-0103064 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 64/32

0-0103140 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 37/40 D. EXT 44

0-0103144 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 40/44 D. EXT 48

0-0103148 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 43/48 D. EXT 52



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

0-0103152 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 46/52 D. EXT 56
0-0103156 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 49/56 D. EXT 60
0-0103160 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 53/60 D. EXT 64
0-0103240 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 37/40 D. EXT 44
0-0103244 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 40/44 D. EXT 48
0-0103248 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 43/48 D. EXT 52
0-0103252 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 46/52 D. EXT 56
0-0103256 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 49/56 D. EXT 60
0-0103260 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 53/60 D. EXT 64
0-0105001 Gancho para trocánter derecho largo 90 mm
0-0105002 Gancho para trocánter derecho largo 100 mm
0-0105101 Gancho para trocánter izquierdo largo 90 mm
0-0105102 Gancho para trocánter izquierdo largo 100 mm
1-0105201 Placa trocantérica largo 70 mm
1-0105202 Placa trocantérica largo 85 mm
1-0105203 Placa trocantérica largo 100 mm
1-0105301 Placa trocantérica con patas laterales largo 70 mm
1-0105302 Placa trocantérica con patas laterales largo 85 mm
1-0105303 Placa trocantérica con patas laterales largo 100 mm
1-0105512 Hilo de cerclaje 12/10 largo 550 mm (acondicionamiento 10 artículos)
1-0105514 Hilo de cerclaje 14/10 largo 550 mm (acondicionamiento 10 artículos)
1-0105712 Hilo de cerclaje 12/10 largo 550 mm (acondicionamiento 1 artículo)
1-0105714 Hilo de cerclaje 14/10 largo 550 mm (acondicionamiento 1 artículo)
1-0102540 Cúpula intermedia Talle 40/22
1-0102542 Cúpula intermedia Talle 42/22
1-0102544 Cúpula intermedia Talle 44/22
1-0102546 Cúpula intermedia Talle 46/22



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0102548 Cúpula intermedia Talle 48/22
- 1-0102550 Cúpula intermedia Talle 50/22
- 1-0102552 Cúpula intermedia Talle 52/22
- 1-0102554 Cúpula intermedia Talle 54/22
- 1-0102556 Cúpula intermedia Talle 56/22
- 1-0102648 Cúpula intermedia Talle 48/28
- 1-0102650 Cúpula intermedia Talle 50/28
- 1-0102652 Cúpula intermedia Talle 52/28
- 1-0102654 Cúpula intermedia Talle 54/28
- 1-0102656 Cúpula intermedia Talle 56/28
- 1-0102658 Cúpula intermedia Talle 58/28
- 1-0102660 Cúpula intermedia Talle 60/28
- 1-0102662 Cúpula intermedia Talle 62/28
- 1-0102664 Cúpula intermedia Talle 64/28
- 1-0106344 Cotilo retentivo para cementar Talle 44/28
- 1-0106346 Cotilo retentivo para cementar Talle 46/28
- 1-0106348 Cotilo retentivo para cementar Talle 48/28
- 1-0106350 Cotilo retentivo para cementar Talle 50/28
- 1-0106352 Cotilo retentivo para cementar Talle 52/28
- 1-0106354 Cotilo retentivo para cementar Talle 54/28
- 1-0106356 Cotilo retentivo para cementar Talle 56/28
- 1-0106358 Cotilo retentivo para cementar Talle 58/28
- 1-0100301 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 1
- 1-0100302 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 2
- 1-0100303 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 3
- 1-0100304 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 4
- 1-0100305 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 5
- 1-0100306 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 6
- 1-0100307 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 7
- 1-0100308 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 8
- 1-0100401 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0100402 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 2
- 1-0100403 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 3
- 1-0100404 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 4
- 1-0100405 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 5
- 1-0100406 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 6
- 1-0100407 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 7
- 0-0103801 Metáfisis estándar EXTREME® con HAP - Talle 1
- 0-0103802 Metáfisis estándar EXTREME® con HAP - Talle 2
- 0-0103803 Metáfisis estándar EXTREME® con HAP - Talle 3
- 0-0103804 Metáfisis estándar EXTREME® con HAP - Talle 4
- 0-0104101 Epífisis EXTREME® - Talle 1
- 0-0104102 Epífisis EXTREME® - Talle 2
- 0-0104103 Epífisis EXTREME® - Talle 3
- 0-0104104 Epífisis EXTREME® - Talle 4
- 0-0104201 Epífisis EXTREME® - Talle 1 con collarete
- 0-0104202 Epífisis EXTREME® - Talle 2 con collarete
- 0-0104203 Epífisis EXTREME® - Talle 3 con collarete
- 0-0104204 Epífisis EXTREME® - Talle 4 con collarete
- 0-0107201 Epífisis-Metáfisis monobloc EXTREME ® con HAP - Talle 1
- 0-0107202 Epífisis-Metáfisis monobloc EXTREME ® con HAP - Talle 2
- 0-0107203 Epífisis-Metáfisis monobloc EXTREME ® con HAP - Talle 3
- 0-0107204 Epífisis-Metáfisis monobloc EXTREME ® con HAP - Talle 4
- 1-0104301 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 10 largo 250 mm
- 1-0104302 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 10 largo 300 mm
- 1-0104303 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 10 largo 350 mm
- 1-0104311 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 12 largo 250 mm
- 1-0104312 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 12 largo 300 mm
- 1-0104313 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 12 largo 350 mm
- 1-0104314 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 12 largo 400 mm
- 1-0104321 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 14 largo 250 mm
- 1-0104322 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 14 largo 300 mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0104323 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 14 largo 350 mm
- 1-0104324 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 14 largo 400 mm
- 1-0104331 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 16 largo 250 mm
- 1-0104332 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 16 largo 300 mm
- 1-0104333 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 16 largo 350 mm
- 1-0104334 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 16 largo 400 mm
- 1-0104341 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 18 largo 250 mm
- 1-0104342 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 18 largo 300 mm
- 1-0104343 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 18 largo 350 mm
- 1-0104344 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 18 largo 400 mm
- 1-0104351 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 20 largo 250 mm
- 1-0104352 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 20 largo 300 mm
- 1-0104353 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 20 largo 350 mm
- 1-0104354 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 20 largo 400 mm
- 1-0105611 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento - Ø 12 largo 250 mm
- 1-0105612 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento - Ø 12 largo 300 mm
- 1-0105613 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento - Ø 12 largo 350 mm
- 1-0105621 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento - Ø 14 largo 250 mm
- 1-0105622 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento - Ø 14 largo 300 mm
- 1-0105623 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento - Ø 14 largo 350 mm
- 0-0106811 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 12 largo 250 mm
- 0-0106812 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 12 largo 300 mm
- 0-0106821 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 14 largo 250 mm
- 0-0106822 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 14 largo 300 mm
- 0-0106831 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 16 largo 250 mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 0-0106832 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 16 largo 300 mm
- 0-0104420 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 20 mm
- 0-0104425 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 25 mm
- 0-0104430 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 30 mm
- 0-0104435 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 35 mm
- 0-0104440 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 40 mm
- 0-0104445 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 45 mm
- 0-0104450 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 50 mm
- 0-0104455 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 55 mm
- 0-0104460 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 60 mm
- 0-0104465 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 65 mm
- 0-0104470 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 70 mm
- 0-0104475 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 75 mm
- 0-0104480 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 80 mm
- 1-01073R1 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 1 lado derecho Ø 12 lg 200 mm
- 1-01073R2 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 2 lado derecho Ø 12 lg 200 mm
- 1-01073R3 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 3 lado derecho Ø 12 lg 200 mm
- 1-01076R3 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 3 lado derecho Ø 14 lg 200 mm
- 1-01073R4 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 4 lado derecho Ø 14 lg 200 mm
- 1-01073R5 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 5 lado derecho Ø 16 lg 200 mm
- 1-01073L1 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 1 lado izquierdo Ø 12 lg 200 mm
- 1-01073L2 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 2 lado izquierdo Ø 12 lg 200 mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-01073L3 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 3 lado izquierdo Ø 12 lg 200 mm

1-01076L3 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 3 lado izquierdo Ø 14 lg 200 mm

1-01073L4 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 4 lado izquierdo Ø 14 lg 200 mm

1-01073L5 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 5 lado izquierdo Ø 16 lg 200 mm

1-01074R1 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 1 lado derecho Ø 12 lg 250 mm

1-01074R2 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 2 lado derecho Ø 12 lg 250 mm

1-01074R3 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 3 lado derecho Ø 12 lg 250 mm

1-01077R3 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 3 lado derecho Ø 14 lg 250 mm

1-01074R4 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 4 lado derecho Ø 14 lg 250 mm

1-01074R5 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 5 lado derecho Ø 16 lg 250 mm

1-01074L1 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 1 lado izquierdo Ø 12 lg 250 mm

1-01074L2 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 2 lado izquierdo Ø 12 lg 250 mm

1-01074L3 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 3 lado izquierdo Ø 12 lg 250 mm

1-01077L3 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 3 lado izquierdo Ø 14 lg 250 mm

1-01074L4 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 4 lado izquierdo Ø 14 lg 250 mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-01074L5 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 5
lado izquierdo Ø 16 lg 250 mm

1-0107530 Chaveta de cierre para vástago OPTIMAL ® largo 30 mm

1-0107535 Chaveta de cierre para vástago OPTIMAL ® largo 35 mm

1-0107540 Chaveta de cierre para vástago OPTIMAL ® largo 40 mm

1-0107545 Chaveta de cierre para vástago OPTIMAL ® largo 45 mm

2-0100201 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 1

2-0100202 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 2

2-0100203 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 3

2-0100204 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 4

2-0100205 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 5

2-0100206 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 6

2-0100207 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 7

2-0100208 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 8

2-0100412 Cabeza de ensayo para vástago Ø 26 Cuello corto

2-0100414 Cabeza de ensayo para vástago Ø 26 Cuello largo

2-0100501 Cuello de ensayo Ø 28 Cuello corto

2-0100502 Cuello de ensayo Ø 28 Cuello mediano

2-0100503 Cuello de ensayo Ø 28 Cuello largo

2-0100504 Cuello de ensayo Ø 28 Cuello extra largo

2-0100505 Cuello de ensayo Ø 22.2 Cuello corto

2-0100506 Cuello de ensayo Ø 22.2 Cuello mediano

2-0100507 Cuello de ensayo Ø 22.2 Cuello largo

2-0100508 Cuello de ensayo Ø 32 Cuello corto

2-0100509 Cuello de ensayo Ø 32 Cuello mediano

2-0100510 Cuello de ensayo Ø 32 Cuello largo

2-0100511 Cuello de ensayo Ø 32 Cuello extra largo

2-0201000 Llave de agarre universal

2-0101400 Percutor de cabeza Ø 22.2

2-0103100 Manga porta raspador

2-0102900 Vástago para masa deslizante



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0103200 Extremidad para masa deslizante de vástago femoral
2-0103300 Cilindro para masa deslizante
2-0114000 Perno suave Ø 2 A/P
2-0103500 Porta escariador
2-0103700 Trocanterómetro
2-0114200 Percutor de cabeza Ø28 y Ø32
2-0101352 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 52/32
2-0101354 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 54/32
2-0101356 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 56/32
2-0101358 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 58/32
2-0101360 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 60/32
2-0101362 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 62/32
2-0101364 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 64/32
2-0101640 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 40/22
2-0101642 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 42/22
2-0101644 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 44/22
2-0101646 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 46/22
2-0101648 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 48/22
2-0101650 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 50/22
2-0101652 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 52/22
2-0101654 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 54/22
2-0101656 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 56/22
2-0101658 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 58/22
2-0101660 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 60/22
2-0101662 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 62/22
2-0101664 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 64/22
2-0101748 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 48/28
2-0101750 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 50/28
2-0101752 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 52/28
2-0101754 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 54/28
2-0101756 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 56/28

S
r



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0101758 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 58/28
2-0101760 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 60/28
2-0101762 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 62/28
2-0101764 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 64/28
2-0101852 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 52/32
2-0101854 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 54/32
2-0101856 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 56/32
2-0101858 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 58/32
2-0101860 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 60/32
2-0101862 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 62/32
2-0101864 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 64/32
2-0102200 Guía de perforación para broca Ø 3.2
2-0102100 Destornillador de cardan H 3.5
2-0102700 Medidor de tornillo
2-0102800 Pinza porta tornillo
2-0104000 Pinza porta tornillo de fondo de cúpula
2-0104140 Cúpula de ensayo Talle 40
2-0104142 Cúpula de ensayo Talle 42
5, 2-0104144 Cúpula de ensayo Talle 44
2-0104146 Cúpula de ensayo Talle 46
2-0104148 Cúpula de ensayo Talle 48
2-0104150 Cúpula de ensayo Talle 50
2-0100152 Cúpula de ensayo Talle 52
2-0100154 Cúpula de ensayo Talle 54
2-0100156 Cúpula de ensayo Talle 56
2-0100158 Cúpula de ensayo Talle 58
2-0100160 Cúpula de ensayo Talle 60
2-0100162 Cúpula de ensayo Talle 62
2-0100164 Cúpula de ensayo Talle 64
2-0100722 Percutor de núcleo con borde plano Ø 22.2
2-0100728 Percutor de núcleo con borde plano Ø 28



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

..//

2-0100732 Percutor de núcleo con borde plano Ø 32
2-0101922 Percutor de núcleo con reborde Ø 22.2
2-0101928 Percutor de núcleo con reborde Ø 28
2-0101932 Percutor de núcleo con reborde Ø 32
2-0101500 Destornillador derecho H3.5
2-0101140 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 40/22
2-0101142 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 42/22
2-0101144 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 44/22
2-0101146 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 46/22
2-0101148 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 48/22
2-0101150 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 50/22
2-0101152 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 52/22
2-0101154 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 54/22
2-0101156 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 56/22
2-0101158 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 58/22
2-0101160 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 60/22
2-0101162 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 62/22
2-0101164 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 64/22
2-0101248 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 48/28
2-0101250 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 50/28
2-0101252 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 52/28
2-0101254 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 54/28
2-0101256 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 56/28
2-0101258 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 58/28
2-0101260 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 60/28
2-0101262 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 62/28
2-0101264 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 64/28
2-0102400 Broca Ø 3.2 largo 145 mm
2-0103800 Broca corta Ø 3.2 largo 35 mm
2-0102500 Broca corta Ø 3.2 largo 50 mm
2-0102600 Broca larga Ø 3.2 largo 70 mm

5,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0103400 Introdutor de obturador diafisario
- 2-0104401 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 48/28
- 2-0104402 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 50/28 y 52/28
- 2-0104403 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 54/28
- 2-0104404 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 56/28 y 58/28
- 2-0104405 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 60/28 y 62/28
- 2-0104406 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 64/28
- 2-0104501 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 54/32
- 2-0104502 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 56/32 y 58/32
- 2-0104503 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 60/32 y 62/32
- 2-0104504 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 64/32
- 2-0118100 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 50/32 y 52/32
- 2-0116501 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 56/36 y 58/36
- 2-0116502 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 60/36 y 62/36
- 2-0116503 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 64/36
- 2-0100415 Cabeza de ensayo para vástago Ø36 Cuello corto
- 2-0100416 Cabeza de ensayo para vástago Ø36 Cuello mediano
- 2-0100417 Cabeza de ensayo para vástago Ø36 Cuello largo
- 2-0100512 Cuello de ensayo Ø 36 Cuello corto
- 2-0100513 Cuello de ensayo Ø 36 Cuello mediano
- 2-0100514 Cuello de ensayo Ø 36 Cuello largo
- 2-0100612 Cuello de ensayo de revisión Ø 36 Cuello corto
- 2-0100613 Cuello de ensayo de revisión Ø 36 Cuello mediano
- 2-0100614 Cuello de ensayo de revisión Ø 36 Cuello largo
- 2-0104136 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 36
- 2-0104336 Extremidad para agarre de cabeza femoral Ø 36
- 2-0100148 Cúpula de ensayo Talle 48
- 2-0100150 Cúpula de ensayo Talle 50
- 2-0100800 Percutor de cúpula
- 2-0102200 Guía de perforación para broca Ø3.2
- 2-0102800 Pinza para tornillo



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0104128 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 28
2-0104132 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 32
2-0107600 Percutor extractor de inserto de cerámica
2-0102400 Broca Ø 3.2 largo 145 mm
2-0103800 Broca larga Ø 3.2 largo 35 mm
2-0102500 Broca larga Ø 3.2 largo 50 mm
2-0102600 Broca larga Ø 3.2 largo 70 mm
2-0102300 Árbol flexible para broca Ø 3.2
2-0105644 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 44/22
2-0105646 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 46/22
2-0105648 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 48/22
2-0105650 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 50/22
2-0105652 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 52/22
2-0105654 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 54/22
2-0105656 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 56/22
2-0105658 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 58/22
2-0105660 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 60/22
2-0105662 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 62/22
2-0105664 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 64/22
2-0105666 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 66/22
2-0105748 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 48/28
2-0105750 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 50/28
2-0105752 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 52/28
2-0105754 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 54/28
2-0105756 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 56/28
2-0105758 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 58/28
2-0105760 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 60/28
2-0105762 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 62/28
2-0105764 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 64/28
2-0105766 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 66/28
2-0107600 Extractor de inserto



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0105844 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 44
2-0105846 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 46
2-0105848 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 48
2-0105850 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 50
2-0105852 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 52
2-0105854 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 54
2-0105856 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 56
2-0105858 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 58
2-0105860 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 60
2-0105862 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 62
2-0105864 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 64
2-0105866 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 66
2-0105900 Prensa para Cotilo doble movilidad
2-0106100 Zócalo de mesa para prensa doble movilidad
2-0106400 Extremidad 6 lados H3 para llave universal
2-0106500 Extractor de inserto doble movilidad
2-0107000 Reductor de inserto doble movilidad
2-0107700 Percutor de bomba para cúpula doble movilidad
2-0107800 Manga para percutor doble movilidad
2-0116700 Extensión para percutor doble movilidad
2-0205500 Llave para atornillar
2-0108144 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 44
2-0108146 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 46
2-0108148 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 48
2-0108150 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 50
2-0108152 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 52
2-0108154 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 54
2-0108156 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 56
2-0108158 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 58
2-0108160 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 60
2-0108162 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 62

5,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0108164 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 64
2-0108166 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 66
2-0191044 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 44
2-0191046 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 46
2-0191048 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 48
2-0191050 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 50
2-0191052 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 52
2-0191054 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 54
2-0191056 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 56
2-0191058 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 58
2-0191060 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 60
2-0191062 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 62
2-0191064 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 64
2-0191066 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 66
2-0191100 Alargador para percutor de bomba
2-0192100 Manga para percutor doble movilidad de navegación
2-0108900 Herramienta de contorno
2-0111400 Percutor final de cúpula doble movilidad
2-0112400 Horquilla INICIAL para prensa doble movilidad
2-0113100 Horquilla 12/14 para prensa doble movilidad
2-0106900 Extractor de cúpula
2-0107600 Percutor extractor de inserto de cerámica
2-0108200 Broca AO Ø largo 145 mm
2-0190700 Cuerpo percutor de cúpula
2-0190840 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 40
2-0190842 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 42
2-0190844 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 44
2-0190846 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 46
2-0190848 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 48
2-0190850 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 50
2-0190852 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 52



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0190854 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 54
- 2-0190856 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 56
- 2-0190858 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 58
- 2-0190860 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 60
- 2-0190862 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 62
- 2-0190864 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 64
- 2-0116800 Palpador de navegación para cadera
- 2-0117700 Soporte G para navegación vástago décubitis lateral
- 2-0117701 Soporte G para navegación vástago décubitis dorsal
- 2-0193401 Soporte G para navegación vástago décubitis Anterior Der. / Posterior Izq.
- 2-0193402 Soporte G para navegación vástago décubitis Anterior Izq. / Anterior Der.
- 2-0117801 Manga porta raspador curvo de navegación
- 2-0117100 Sistema de fijación derecho para geometría de navegación
- 2-0117200 Sistema de fijación inclinado para geometría de navegación
- 2-0117300 Cuerpo rígido I cresta iliaca para navegación
- 2-0117400 Cuerpo rígido F fémur para navegación
- 2-0117500 Cuerpo rígido G instrumentación para navegación
- 2-0117600 Llave de agarre universal para navegación
- 2-0208700 Seguro para fijación Ø4 largo 150 mm
- 2-0208702 Seguro para fijación Ø4 largo 100 mm
- 2-0101200 Bloqueo AO para broca auto perforante
- 2-0192500 Porta fresa IMA mecánica / para navegación
- 2-0192940 Fresa para Cotilo Ø 40
- 2-0192944 Fresa para Cotilo Ø 44
- 2-0192946 Fresa para Cotilo Ø 46
- 2-0192948 Fresa para Cotilo Ø 48
- 2-0192950 Fresa para Cotilo Ø 50
- 2-0192952 Fresa para Cotilo Ø 52
- 2-0192954 Fresa para Cotilo Ø 54



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0192956 Fresa para Cotilo Ø 56

2-0192958 Fresa para Cotilo Ø 58

2-0192960 Fresa para Cotilo Ø 60

2-0192962 Fresa para Cotilo Ø 62

2-0192964 Fresa para Cotilo Ø 64

2-0192966 Fresa para Cotilo Ø 66

2-01156D1 Raspador talle 1 derecho para vástago femoral anatómico modular

2-01156D2 Raspador talle 2 derecho para vástago femoral anatómico modular

2-01156D3 Raspador talle 3 derecho para vástago femoral anatómico modular

2-01156D4 Raspador talle 4 derecho para vástago femoral anatómico modular

2-01156D5 Raspador talle 5 derecho para vástago femoral anatómico modular

2-01156D6 Raspador talle 6 derecho para vástago femoral anatómico modular

2-01156D7 Raspador talle 7 derecho para vástago femoral anatómico modular

U

2-01156G1 Raspador talle 1 izquierdo para vástago femoral anatómico modular

2-01156G2 Raspador talle 2 izquierdo para vástago femoral anatómico modular

2-01156G3 Raspador talle 3 izquierdo para vástago femoral anatómico modular

2-01156G4 Raspador talle 4 izquierdo para vástago femoral anatómico modular

2-01156G5 Raspador talle 5 izquierdo para vástago femoral anatómico modular



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-01156G6 Raspador talle 6 izquierdo para vástago femoral anatómico modular

2-01156G7 Raspador talle 7 izquierdo para vástago femoral anatómico modular

2-0115700 Extremidad esférica H.5

2-0115900 Percutor de vástago femoral modular

2-0116000 Extractor de vástago femoral modular

2-0116300 Herramienta sacabocado

2-0116900 Manga porta raspador derecho para navegación

2-0116101 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral / medial 10/12

2-0116102 Cuello de ensayo modular para vástago Anterior / Retraído 8° 10/12

2-0116103 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral plus / medial plus 10/12

2-0116104 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral / medial +7 10/12

2-0116105 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral / medial +10.5 10/12

2-0116401 Cuello de ensayo modular para raspador - LATERAL 10/12

2-0116402 Cuello de ensayo modular para raspador - MEDIAL 10/12

2-0116403 Cuello de ensayo modular para raspador - LATERAL PLUS 10/12

2-0116404 Cuello de ensayo modular para raspador - MEDIAL PLUS 10/12

2-0116405 Cuello de ensayo modular para raspador - ANTE izquierdo / RETRA derecho 8° 10/12

2-0116406 Cuello de ensayo modular para raspador - ANTE derecho / RETRA izquierdo 8° LATERAL 10/12

2-0116407 Cuello de ensayo modular para raspador - LATERAL +7 10/12

2-0116408 Cuello de ensayo modular para raspador - MEDIAL +7 10/12

2-0116409 Cuello de ensayo modular para raspador - LATERAL +10.5 10/12

2-0116410 Cuello de ensayo modular para raspador - MEDIAL +10.5 10/12



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0116200 Colocador de cuello modular
- 2-0191800 Colocador de cuello modular 12/14
- 2-0191400 Percutor final de cuello modular 12/14
- 2-0118400 Llave 19
- 2-0115800 Percutor de cabeza y cuello modular 10/12
- 2-0196800 Percutor de cabeza y cuello modular 12/14
- 2-0104328 Extremidad para agarre de cabeza femoral Ø 28
- 2-0191201 Cuello de prueba modular para vástago Lateral / Medial 12/14
- 2-0191202 Cuello de prueba modular para vástago Anterior/ Retraído 8° 12/14
- 2-0191203 Cuello de prueba modular para vástago Lateral plus / Medial plus 12/14
- 2-0191205 Cuello de prueba modular para vástago Lateral / Medial +10.5 12/14
- 2-0191301 Cuello de prueba modular para vástago LATERAL 12/14
- 2-0191302 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL 12/14
- 2-0191303 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL PLUS 12/14
- 2-0191304 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL PLUS 12/14
- 2-0191305 Cuello de prueba modular para raspador ANTE izquierdo / RETRA derecho 8° 12/14
- 2-0191306 Cuello de prueba modular para raspador ANTE derecho / RETRA izquierdo 8° 12/14
- 2-0191309 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL 12/14 + 10.5
- 2-0191310 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL 12/14 +10.5
- 2-0197101 Cuello de prueba modular para vástago Lateral / medial 12/14
- 2-0197102 Cuello de prueba modular para vástago Anterior / Retraído 8° 12/14
- 2-0197103 Cuello de prueba modular para vástago Lateral plus / Medial plus 12/14
- 2-0197104 Cuello de prueba modular para vástago Lateral / Medial +10.5 12/14



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0197201 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL 12/14
- 2-0197202 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL 12/14
- 2-0197203 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL PLUS 12/14
- 2-0197204 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL PLUS 12/14
- 2-0197205 Cuello de prueba modular para raspador ANTE izquierdo / RETRA derecho 8° 12/14
- 2-0197206 Cuello de prueba modular para raspador ANTE derecho / RETRA izquierdo 8° 12/14
- 2-0197207 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL +10.5 12/14
- 2-0197208 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL +10.5 12/14
- 2-0196101 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 28 cuello corto
- 2-0196102 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 28 cuello mediano
- 2-0196103 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 28 cuello largo
- 2-0196104 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 22.2 cuello corto
- 2-0196105 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 22.2 cuello mediano
- 2-0196106 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 22.2 cuello largo
- 2-0196107 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 32 cuello corto
- 2-0196108 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 32 cuello mediano
- 2-0196109 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 32 cuello largo
- 2-0196110 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 36 cuello corto
- 2-0196111 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 36 cuello mediano
- 2-0196112 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 36 cuello largo
- 2-0100201 Raspador femoral de primera intervención Talle 1
- 2-0100202 Raspador femoral de primera intervención Talle 2
- 2-0100203 Raspador femoral de primera intervención Talle 3
- 2-0100204 Raspador femoral de primera intervención Talle 4
- 2-0100205 Raspador femoral de primera intervención Talle 5
- 2-0100206 Raspador femoral de primera intervención Talle 6
- 2-0100207 Raspador femoral de primera intervención Talle 7
- 2-0108600 Porta Cotilo corto
- 2-0108700 Orientador de porta Cotilo corto



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0105122 Extremidad esférica Ø 22.2
2-0105128 Extremidad esférica Ø 28
2-0105240 Señuelo cotiloideo Ø 37/40
2-0105242 Señuelo cotiloideo Ø 38.5/42
2-0105244 Señuelo cotiloideo Ø 40/44
2-0105246 Señuelo cotiloideo Ø 41.5/46
2-0105248 Señuelo cotiloideo Ø 43/48
2-0105250 Señuelo cotiloideo Ø 44.5/50
2-0105252 Señuelo cotiloideo Ø 46/52
2-0105254 Señuelo cotiloideo Ø 47.5/54
2-0105256 Señuelo cotiloideo Ø 49/56
2-0105258 Señuelo cotiloideo Ø 51/58
2-0105260 Señuelo cotiloideo Ø 53/60
2-0105340 Cotilo de ensayo Ø 22.2/37/40
2-0105342 Cotilo de ensayo Ø 22.2/38.5/42
2-0105344 Cotilo de ensayo Ø 22.2/40/44
2-0105346 Cotilo de ensayo Ø 22.2/41.5/46
2-0105348 Cotilo de ensayo Ø 22.2/43/48
2-0105350 Cotilo de ensayo Ø 22.2/44.5/50
2-0105352 Cotilo de ensayo Ø 22.2/46/52
2-0105354 Cotilo de ensayo Ø 22.2/47.5/54
2-0105356 Cotilo de ensayo Ø 22.2/49/56
2-0105358 Cotilo de ensayo Ø 22.2/51/58
2-0105360 Cotilo de ensayo Ø 22.2/53/60
2-0105448 Cotilo de ensayo Ø 28/43/48
2-0105450 Cotilo de ensayo Ø 28/44.5/50
2-0105452 Cotilo de ensayo Ø 28/46/52
2-0105454 Cotilo de ensayo Ø 28/47.5/54
2-0105456 Cotilo de ensayo Ø 28/49/56
2-0105458 Cotilo de ensayo Ø 28/51/58
2-0105460 Cotilo de ensayo Ø 28/53/60



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0105540 Arandela con uña Ø 37/40

2-0105542 Arandela con uña Ø 38.5/42

2-0105544 Arandela con uña Ø 40/44

2-0105546 Arandela con uña Ø 41.5/46

2-0105548 Arandela con uña Ø 43/48

2-0105550 Arandela con uña Ø 44.5/50

2-0105552 Arandela con uña Ø 46/52

2-0105554 Arandela con uña Ø 47.5/54

2-0105556 Arandela con uña Ø 49/56

2-0105558 Arandela con uña Ø 51/58

2-0105560 Arandela con uña Ø 53/60

2-0104900 Porta Cotilo

2-0105000 Orientador de porta Cotilo

2-0190101 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 101S

2-0190102 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 102S

2-0190201 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 201S

2-0190202 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 202S

2-0190203 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 203S

2-0190301 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 301S

2-0190302 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 302S

2-0190303 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 303S

2-0190401 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 401S

2-0190402 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 402S

2-0190403 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 403S

2-0190501 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 501S

2-0190502 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 502S

2-0190601 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 601S

2-0190602 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 602S

2-0180101 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 101S

2-0180102 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 102S

2-0180201 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 201S



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0180202 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 202S
2-0180203 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 203S
2-0180301 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 301S
2-0180302 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 302S
2-0180303 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 303S
2-0180401 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 401S
2-0180402 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 402S
2-0180403 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 403S
2-0180501 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 501S
2-0180502 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 502S
2-0180601 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 601S
2-0180602 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 602S
2-0104700 Árbol de extracción de mana de raspador
2-0170101 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 101S
2-0170102 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 102S
2-0170201 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 201S
2-0170202 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 202S
2-0170203 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 203S
2-0170301 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 301S
2-0170302 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 302S
2-0170303 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 303S
2-0170401 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 401S
2-0170402 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 402S
2-0170403 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 403S
2-0170501 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 501S
2-0170502 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 502S
2-0170601 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 601S
2-0170602 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 602S
2-0104800 Percutor para vástago femoral
2-0107100 Porta prótesis femoral
2-0100413 Cabeza de ensayo para vástago Ø 26 cuello mediano



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0106800 Cabeza de ensayo femoral INITIALE ® 0
- 2-0106804 Cabeza de ensayo femoral INITIALE ® +4
- 2-0106803 Cabeza de ensayo femoral INITIALE ® -3
- 2-0106700 Extractor de vástago de ensayo
- 2-0118306 Llave plana 6 mm (Inox)
- 2-0118308 Llave plana 8 mm (Inox)
- 2-0104322 Extremidad para agarre de cabeza femoral Ø 22.2
- 2-0160121 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N°
121 D
- 2-0160221 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N°
221 D
- 2-0160321 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N°
321 D
- 2-0160421 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N°
421 D
- 2-0160521 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N°
521 D
- 2-0160511 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N°
511 D
- 5, 2-0160531 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N°
531 D
- 2-0150121 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N°
121 D
- 2-0150221 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N°
221 D
- 2-0150321 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N°
321 D
- 2-0150421 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N°
421 D
- 2-0150521 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N°
521 D



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0140121 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 121 D

2-0140221 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 221 D

2-0140321 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 321 D

2-0140421 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 421 D

2-0140521 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 521 D

2-0140511 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 511 D

2-0140531 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 531 D

2-0130220 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
202 largo 200 mm

2-0130225 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
202 largo 250 mm

2-0130230 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
202 largo 300 mm

2-0130235 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
202 largo 350 mm

2-0130320 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
302 largo 200 mm

2-0130325 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
302 largo 250 mm

5
2-0130330 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
302 largo 300 mm

2-0130335 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
302 largo 350 mm

2-0130420 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
402 largo 200 mm

2-0130425 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
402 largo 250 mm

2-0130430 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
402 largo 300 mm

2-0130435 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
402 largo 350 mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0130520 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
501 largo 200 mm
- 2-0130525 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
501 largo 250 mm
- 2-0130530 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
501 largo 300 mm
- 2-0120535 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
501 largo 350 mm
- 2-0120220 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
202 largo 200 mm
- 2-0120225 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
202 largo 250 mm
- 2-0120230 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
202 largo 300 mm
- 2-0120235 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 350 mm
- 2-0120320 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 200 mm
- 2-0120325 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 250 mm
- 2-0120330 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 300 mm
- 2-0120335 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 350 mm
- 2-0120420 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
402 largo 200 mm
- 2-0120425 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
402 largo 250 mm
- 2-0120430 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
402 largo 300 mm



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0120435 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
402 largo 350 mm
- 2-0120520 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
501 largo 200 mm
- 2-0120525 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
501 largo 250 mm
- 2-0120530 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
501 largo 300 mm
- 2-0120535 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
501 largo 350 mm
- 2-0192411 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N°
101S
- 2-0192412 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N°
102S
- 2-0192421 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N°
201S
- 2-0192422 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N°
202S
- 2-0192423 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N°
203S
- 2-0192431 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N°
301S
- 2-0192432 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N°
302S
- 2-0192433 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N°
303S
- 2-0192441 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N°
401S
- 2-0192442 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N°
402S



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0192443 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 403S

2-0192451 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 501S

2-0192452 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 502S

2-0192461 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 601S

2-0192462 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 602S

2-0117702 Soporte G para navegación Vástago INITIALE® modular decubitus lateral

2-0117703 Soporte G para navegación Vástago INITIALE® modular decubitus dorsal

2-0103612 Escariador 12 X 10

2-0103618 Escariador 18 X 10

2-0197511 Raspador INITIALE® Talle 101 sin Trocanterómetro

2-0197512 Raspador INITIALE® Talle 102 sin Trocanterómetro

2-0197521 Raspador INITIALE® Talle 201 sin Trocanterómetro

2-0197522 Raspador INITIALE® Talle 202 sin Trocanterómetro

2-0197523 Raspador INITIALE® Talle 203 sin Trocanterómetro

2-0197531 Raspador INITIALE® Talle 301 sin Trocanterómetro

2-0197532 Raspador INITIALE® Talle 302 sin Trocanterómetro

2-0197533 Raspador INITIALE® Talle 303sin Trocanterómetro

2-0197541 Raspador INITIALE® Talle 401 sin Trocanterómetro

2-0197542 Raspador INITIALE® Talle 402 sin Trocanterómetro

2-0197543 Raspador INITIALE® Talle 403 sin Trocanterómetro

2-0197551 Raspador INITIALE® Talle 501 sin Trocanterómetro

2-0197552 Raspador INITIALE® Talle 502 sin Trocanterómetro

2-0197561 Raspador INITIALE® Talle 601 sin Trocanterómetro

2-0197562 Raspador INITIALE® Talle 602 sin Trocanterómetro



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0109000 Manga porta fresa cilíndrica
- 2-0109110 Fresa cilíndrica Ø 10
- 2-0109112 Fresa cilíndrica Ø 12
- 2-0109114 Fresa cilíndrica Ø 14
- 2-0109116 Fresa cilíndrica Ø 16
- 2-0109118 Fresa cilíndrica Ø 16
- 2-0200100 Broca intramedular
- 2-0100140 Cúpula de ensayo talle 40
- 2-0100142 Cúpula de ensayo talle 42
- 2-0100144 Cúpula de ensayo talle 44
- 2-0100146 Cúpula de ensayo talle 46
- 2-0100722 Percutor de núcleo con borde plano Ø22.2
- 2-0100728 Percutor de núcleo con borde plano Ø28
- 2-0100732 Percutor de núcleo con borde plano Ø32
- 2-0101922 Percutor de núcleo con reborde Ø 22.2
- 2-0101928 Percutor de núcleo con reborde Ø 28
- 2-0101932 Percutor de núcleo con reborde Ø 32
- 2-0102000 Orientador de cúpula
- 2-0104122 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 22.2
- 2-0104128 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 28
- 2-0104132 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 32
- 2-0107440 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T37/40 D. EXT 44
- 2-0107444 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T40/44 D. EXT 48
- 2-0107448 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T43/48 D. EXT 52
- 2-0107452 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T46/52 D. EXT 56
- 2-0107456 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T49/56 D. EXT 60
- 2-0107460 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T53/60 D. EXT 64
- 2-0107540 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T37/40 D. EXT 44
- 2-0107544 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T40/44 D. EXT 48



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0107548 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T43/48 D. EXT
52

2-0107552 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T46/52 D. EXT
56

2-0107556 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T49/56 D. EXT
60

2-0107560 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T53/60 D. EXT
64

2-0108800 Herramienta de agarre para fondo de Cotilo

2-0104600 Pinza para tope de retención

2-0101000 Llave de agarre universal

2-0103900 Manga orientadora de núcleo

2-0114400 Percutor para Cotilo para cementar de retención

2-0100301 Raspador femoral de revisión talle 1

2-0100302 Raspador femoral de revisión talle 2

2-0100303 Raspador femoral de revisión talle 3

2-0100304 Raspador femoral de revisión talle 4

2-0100305 Raspador femoral de revisión talle 5

2-0100306 Raspador femoral de revisión talle 6

2-0100307 Raspador femoral de revisión talle 7

2-0100308 Raspador femoral de revisión talle 8

2-0100411 Cabeza de ensayo para vástago Ø 32 cuello extra largo

2-0100601 Cuello de ensayo de revisión Ø 28 cuello corto

2-0100602 Cuello de ensayo de revisión Ø 28 cuello mediano

2-0100603 Cuello de ensayo de revisión Ø 28 cuello largo

2-0100604 Cuello de ensayo de revisión Ø 28 cuello extra largo

2-0100605 Cuello de ensayo de revisión Ø 22.2 cuello corto

2-0100606 Cuello de ensayo de revisión Ø 22.2 cuello mediano

2-0100607 Cuello de ensayo de revisión Ø 22.2 cuello largo

2-0100608 Cuello de ensayo de revisión Ø 32 cuello corto

2-0100609 Cuello de ensayo de revisión Ø 32 cuello mediano

5.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0100610 Cuello de ensayo de revisión Ø 32 cuello largo
- 2-0100611 Cuello de ensayo de revisión Ø 32 cuello extra largo
- 2-0100900 Percutor de vástago
- 2-0103700 Trocanterómetro
- 2-0104200 Empuñadura de sostén
- 2-0104332 Extremidad para agarre de cabeza femoral Ø32
- 2-0112200 Galga de calibración intramedular
- 2-0111000 Regla milimétrica de 300 mm
- 2-0112300 Calibrador de escariador
- 2-0110800 Herramienta de ranurado guía de fresa para trocánter
- 2-0111900 Fresa para clavo diafisario Ø 10 y Ø 12
- 2-0110400 Tuerca de bloqueo para dispositivo de ensayo
- 2-0111101 Clavo diafisario de ensayo Ø 10 largo 250 mm
- 2-0111102 Clavo diafisario de ensayo Ø 10 largo 300 mm
- 2-0111103 Clavo diafisario de ensayo Ø 10 largo 350 mm
- 2-0111111 Clavo diafisario de ensayo Ø 12 largo 250 mm
- 2-0111112 Clavo diafisario de ensayo Ø 12 largo 300 mm
- 2-0111113 Clavo diafisario de ensayo Ø 12 largo 350 mm
- 2-0111114 Clavo diafisario de ensayo Ø 12 largo 400 mm
- 2-0111121 Clavo diafisario de ensayo Ø 14 largo 250 mm
- 2-0111122 Clavo diafisario de ensayo Ø 14 largo 300 mm
- 2-0111123 Clavo diafisario de ensayo Ø 14 largo 350 mm
- 2-0111124 Clavo diafisario de ensayo Ø 14 largo 400 mm
- 2-0111131 Clavo diafisario de ensayo Ø 16 largo 250 mm
- 2-0111132 Clavo diafisario de ensayo Ø 16 largo 300 mm
- 2-0111133 Clavo diafisario de ensayo Ø 16 largo 350 mm
- 2-0111134 Clavo diafisario de ensayo Ø 16 largo 400 mm
- 2-0111141 Clavo diafisario de ensayo Ø 18 largo 250 mm
- 2-0111142 Clavo diafisario de ensayo Ø 18 largo 300 mm
- 2-0111143 Clavo diafisario de ensayo Ø 18 largo 350 mm
- 2-0111144 Clavo diafisario de ensayo Ø 18 largo 400 mm

5



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0111151 Clavo diafisario de ensayo Ø 20 largo 250 mm
- 2-0111152 Clavo diafisario de ensayo Ø 20 largo 300 mm
- 2-0111153 Clavo diafisario de ensayo Ø 20 largo 350 mm
- 2-0111154 Clavo diafisario de ensayo Ø 20 largo 400 mm
- 2-0111701 Metáfisis estándar de ensayo talla 1
- 2-0111702 Metáfisis estándar de ensayo talla 2
- 2-0111703 Metáfisis estándar de ensayo talla 3
- 2-0111704 Metáfisis estándar de ensayo talla 4
- 2-0111711 Metáfisis de ensayo desfasado talla 1 DP/GA
- 2-0111712 Metáfisis de ensayo desfasado talla 2 DP/GA
- 2-0111713 Metáfisis de ensayo desfasado talla 3 DP/GA
- 2-0111714 Metáfisis de ensayo desfasado talla 4 DP/GA
- 2-0111721 Metáfisis de ensayo desfasado talla 1 DA/GP
- 2-0111722 Metáfisis de ensayo desfasado talla 2 DA/GP
- 2-0111723 Metáfisis de ensayo desfasado talla 3 DA/GP
- 2-0111724 Metáfisis de ensayo desfasado talla 4 DA/GP
- 2-0111801 Epífisis de ensayo talla 1
- 2-0111802 Epífisis de ensayo talla 2
- 2-0111803 Epífisis de ensayo talla 3
- 2-0111804 Epífisis de ensayo talla 4
- 2-0111811 Epífisis de ensayo talla 1 con collarete
- 2-0111812 Epífisis de ensayo talla 2 con collarete
- 2-0111813 Epífisis de ensayo talla 3 con collarete
- 2-0111814 Epífisis de ensayo talla 4 con collarete
- 2-0110700 Alargador para clavo diafisario
- 2-0110100 Destornillador derecho H5
- 2-0109401 Manga de raspador metafisario monobloc talla 1
- 2-0109402 Manga de raspador metafisario monobloc talla 2
- 2-0109403 Manga de raspador metafisario monobloc talla 3
- 2-0109404 Manga de raspador metafisario monobloc talla 4
- 2-0103000 Perno suave Ø 2

5,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0109900 Agarre de pieza de ensayo
- 2-0109200 Alargador para clavo diafisario implantable
- 2-0109800 Brazo de manipulación
- 2-0109500 Guía de cierre
- 2-0109700 Tornillo de mantenimiento para brazo de manipulación
- 2-0109600 Placa guía de perforación
- 2-0111500 Tope de bloqueo para broca
- 2-0111200 Medidor de tornillo
- 2-0111300 Tornillo de bloqueo para pieza de ensayo
- 2-0112000 Percutor de metáfisis EXTREME
- 2-0112100 Percutor de epífisis EXTREME
- 2-0191600 Percutor de epífisis EXTREME y metáfisis monobloc
- 2-0110200 Extractor de epífisis
- 2-0110300 Extracto de metáfisis
- 2-0118700 Extractor de metáfisis antes del 2000
- 2-0111920 Vástago extractor de epífisis metáfisis monobloc
- 2-0110500 Eje de mantenimiento
- 2-0113400 Galga de Impacción metafisaria
- 2-0191500 Medidor de impacción epífisis metáfisis monobloc
- 2-0113700 Extremidad extractor de pieza de ensayo
- 2-0114100 Porta prótesis EXTREME
- 2-0119900 Porta prótesis EXTREME monobloc
- 2-0191900 Empuñadura fija largo 150
- 2-0118200 Placa de impacción para vástago femoral de reconstrucción
- 2-0191700 Llave de mantenimiento epífisis EXTREME®
- 2-0119103 Vástago para llave dinamométrica H5
- 2-0111600 Broca para tornillo de cierre
- 2-0197300 Guía de ranurado para escariador flexible Ø 3 largo 500 mm
- 2-0195701 Raspador talle 1 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195702 Raspador talle 2 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195703 Raspador talle 3 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0195713 Raspador talle 3 Ø 14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195704 Raspador talle 4 Ø 14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195715 Raspador talle 5 Ø 14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195705 Raspador talle 5 Ø 16 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195801 Raspador talle 1 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195802 Raspador talle 2 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195803 Raspador talle 3 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195813 Raspador talle 3 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195804 Raspador talle 4 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195815 Raspador talle 5 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195805 Raspador talle 5 Ø 16 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195901 Vástago de ensayo talle 1 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195902 Vástago de ensayo talle 2 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195903 Vástago de ensayo talle 3 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195913 Vástago de ensayo talle 3 Ø 14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195904 Vástago de ensayo talle 4 Ø 14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195915 Vástago de ensayo talle 5 Ø 14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195905 Vástago de ensayo talle 5 Ø 16 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0196001 Vástago de prueba talle 1 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196002 Vástago de prueba talle 2 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196003 Vástago de prueba talle 3 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196013 Vástago de prueba talle 3 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196004 Vástago de prueba talle 4 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196015 Vástago de prueba talle 5 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196005 Vástago de prueba talle 5 Ø 16 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196900 Extractor de vástago femoral modular
- 2-0116300 Tijeras sacabocado
- 2-0116102 Cuello de ensayo modular para vástago Anterior / retraído 8 °10/12
- 2-0116105 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral / Medial +10.5 10/12



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0116401 Cuello de ensayo modular para vástago LATERAL 10/12
- 2-0116402 Cuello de ensayo modular para vástago MEDIAL 10/12
- 2-0116403 Cuello de ensayo modular para vástago LATERAL PLUS 10/12
- 2-0116404 Cuello de ensayo modular para vástago MEDIAL PLUS 10/12
- 2-0116405 Cuello de ensayo modular para vástago ANTE izquierdo/ RETRA derecho 8° 10/12
- 2-0116406 Cuello de ensayo modular para vástago ANTE derecho / RETRA izquierdo 8° 10/12
- 2-0116407 Cuello de ensayo modular para vástago LATERAL +7I 10/12
- 2-0116408 Cuello de ensayo modular para vástago MEDAL +7 10/12
- 2-0116409 Cuello de ensayo modular para vástago - LATERAL +10.5 10/12
- 2-0116410 Cuello de ensayo modular para vástago - MEDIAL +10.5 10/12
- 2-0100401 Cabeza de ensayo para vástago Ø cuello corto
- 2-0100402 Cabeza de ensayo para vástago Ø cuello mediano
- 2-0100403 Cabeza de ensayo para vástago Ø cuello largo
- 2-0100404 Cabeza de ensayo para vástago Ø cuello extra largo
- 2-0100405 Cabeza de ensayo para vástago Ø 22.2 cuello corto
- 2-0100406 Cabeza de ensayo para vástago Ø 22.2 cuello mediano
- 2-0100407 Cabeza de ensayo para vástago Ø 22.2 cuello largo
- 2-0100408 Cabeza de ensayo para vástago Ø 32 cuello corto
- 2-0100409 Cabeza de ensayo para vástago Ø 32 cuello mediano
- 2-0100410 Cabeza de ensayo para vástago Ø 32 cuello largo
- 2-0115800 Percutor de cabeza y cuello modular
- 2-0109300 Empuñadura fija
- 2-0110600 Clavo pulido
- 2-0111500 Tope fijo para broca
- 2-0197700 Medidor de chaveta optimal
- 2-0197800 Destornillador H5 corto para cierre optimal
- 2-0197900 Destornillador H5 largo para cierre optimal
- 2-0110000 Destornillador H5 de cierre
- 2-0196200 Percutor orientador de vástago optimal

5.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0196300 Porta prótesis de vástago optimal
- 2-0196400 Brazo de manipulación de vástago optimal
- 2-0196500 Tornillo de apriete del marco de atornillamiento para vástago optimal
- 2-0196700 Marco de atornillamiento para vástago optimal
- 2-0197012 Escariador guía de fresa para trocánter 12X10
- 2-0197018 Escariador guía de fresa para trocánter 18X10
- 2-0110900 Fresa para trocánter
- 2-0196600 Broca para chaveta de vástago optimal N° 1
- 2-0198000 Broca para chaveta de vástago optimal N° 2
- 2-0118800 Cuerpo percutor de cúpula THA.HY.TI.BJR
- 2-0118000 Porta fresa derecho navegación
- 2-0116800 Palpador navegación cadera
- 2-0119000 Soporte G para navegación vástago décubitus lateral THA.HY.TI BJR
- 2-0118900 Soporte G para navegación vástago décubitus dorsal THA.HY.TI BJR
- 2-0116600 Soporte CR adquisición eje de escariador
- 2-0117100 Sistema de fijación derecho de geometría de navegación
- 2-0117200 Sistema de fijación inclinad de geometría de navegación
- 2-0200800 Destornillador H5
- 2-0117300 Cuerpo rígido I cresta iliaca de navegación
- 2-0117400 Cuerpo rígido F fémur de navegación
- 2-0117600 Llave de agarre universal
- 2-0208700 Seguro para fijación Ø 4 largo 150 mm
- 2-0208702 Seguro para fijación Ø 4 largo 100 mm
- 2-0201100 Bloqueo universal para broca auto perforante
- 2-0201200 Bloqueo universal AO para broca auto perforante
- 3-0400-901 MARCADORES AMPLIVISION estériles (acondicionados en grupos de 7)

5,



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

3-0400-902 MARCADORES AMPLIVISION estériles (acondicionados en grupos de 14)

0-0223700 Brocas AMPLIVISION Ø 4 Lg 150 mm estériles (acondicionados en grupos de 4)

3-0401001 Estación AMPLIVISION

3-0402001 Opción "soporte móvil"

3-0401401 Software PTH

3-0401402 Software PTH (opción BJR)

3-0401403 Software PTH INITIALE

Período de vida útil: 10 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: SOCIETE AMPLITUDE.

Lugar/es de elaboración: 11 Cours Jacques Offenbach, Zone Mozart 2, 26000 Valence, Francia.

Expediente Nº 1-47-19705-11-1

DISPOSICIÓN Nº **0984**

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S
del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN
ANMAT Nº**0.9.8.4**.....

Dr. OTTO A. ÖRSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Sumario de Informaciones básicas de las instrucciones de uso según Anexo III.B de la Disp. 2318/02 (TO 2004)

FABRICANTE: SOCIETE AMPLITUDE

DIRECCION: 11 Cours Jacques Offenbach, Zone Mozart 2, 26000 Valence, Francia.

IMPORTADOR: OSTEOLIFE S.R.L.

DIRECCION: Av. Belgrano 3031(CABA) Argentina

SISTEMA DE PROTESIS TOTAL DE CADERA E INSTRUMENTAL

Marca: **INTEGRALE®**, **LOGIC®**, **GENERIC®**, **NATURE®**, **EQUATEUR®**, **HORIZON®**, **DELTA®**, **SATURNE®**, **ACOR®**, **INITIALE®**, **LUNA®**, **EXTREME®**, **OPTIMAL®**, **AMPLIVISION®**

Modelo: XXX

ESTERIL

PRODUCTO MEDICO DE UN SOLO USO

El material no debe de emplearse para nada más que para lo que está indicado. (de origen)

NOTA INFORMATIVA AL CIRUJANO

Sistema de Prótesis total de cadera

1 - Significado de los símbolos utilizados para el etiquetado:

SIMBOLO	SIGNIFICADO	SIMBOLO	SIGNIFICADO
	DE UN SOLO USO	REF	REFERENCIA DEL CATÁLOGO
	UTILIZAR HASTA		NO UTILIZAN SI LA CAJA ESTÁ DAÑADA
	CÓDIGO DEL LOTE		CONSERVAR EN UN LUGAR SECO
	DISPOSITIVO ESTERILIZADO POR RADIACIÓN		NO CONSERVAR A TEMPERATURA SUPERIOR A 35°C
	ATENCIÓN, VER NOTA INFORMATIVA	HAP	HIDROXIAPATITA

2 - Elección del dispositivo médico a implantar:

La elección del implante debe ser efectuada por el cirujano con total conocimiento de la técnica operatoria y del material puesto a su disposición.

Para facilitar la elección del implante, existen plantillas radiográficas a diferentes escalas. Existe también una técnica operatoria.

3 - El dispositivo:

Este embalaje contiene un dispositivo médico implantable destinado a reemplazar la articulación de la cadera. Este elemento protésico forma parte de un conjunto de implantes que componen una prótesis total de cadera. Para constituir la Prótesis Total de Cadera AMPLITUDE, todos los elementos deben ser de la sociedad AMPLITUDE.

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos

D. MONICA L. ROBERTO
Dirección Técnica
M.N. 13.305

CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.



Si en una prótesis total de cadera se utilizan productos de dos fabricantes (Ej.: vástago y cabeza de un fabricante y cotilo de otro), el cirujano comprobará con sus proveedores la compatibilidad de estas piezas entre si y de la compatibilidad de su uso conjunto.

4 - Identificación del dispositivo:

Todas las indicaciones estrictamente necesarias para el cirujano para identificar el dispositivo se pueden leer en el exterior del embalaje del dispositivo.

El cirujano debe elegir conociendo la compatibilidad entre los distintos componentes (Talla, tipo, espesor, material).

Los vástagos femorales existen en varias tallas y formas (rectos o anatómicos) que permiten adaptarse lo mejor posible a la cavidad medular.

Los vástagos femorales monobloques existen con una cabeza femoral de diámetro 22.2 mm. Los vástagos femorales a cuello modular poseen un ángulo cervicodiafisario diferente según el cuello modular elegido.

Los vástagos femorales de primera intención existen en distintas versiones: recto o anatómico, a cementar o sin cemento, a cuello fijo o a cuello modular y a cabeza fija o a cabeza modular.

El vástago femoral de revisión y reconstrucción OPTIMAL® está destinado a ser colocado sin cemento. Este vástago a cuello modular debe ser colocado solamente con cuellos modulares AMPLITUDE.

Según la indicación y la técnica operatoria, es posible encerrojar o no el implante con clavijas que deben utilizarse solamente con el vástago OPTIMAL®.

El vástago femoral de reconstrucción EXTREME® está destinado a ser colocado sin cemento; consta de dos o tres elementos principales (el clavo diafisario, la epífisis y la metáfisis modulares o la epífisis-metáfisis monobloque) que existen en varios tamaños. El montaje epífisis/metáfisis

EXTREME® debe realizarse entre dos elementos de la misma medida.

Esta restricción aparte, todos los elementos de los vástagos EXTREME® son compatibles el uno con el otro y esto, cualesquiera que sean los tamaños utilizados. Según la indicación y la técnica operatoria, es posible encerrojar o no el implante con tornillos de bloqueo específicos al vástago EXTREME®.

Los cuellos modulares sólo pueden ser colocados con los vástagos a cuellos modulares. Todos los cuellos modulares AMPLITUDE poseen el mismo cono Morse distal, idéntico al de los vástagos a cuellos modulares AMPLITUDE. Así pues, no existe incompatibilidad de montaje Cuello modular/Vástago femoral a cuello modular y esto, cualesquiera que sean los tamaños/modelos utilizados. Los cuellos modulares AMPLITUDE están pensados para ser colocados con cabezas femorales modulares que tienen un cono Morse del mismo tipo y mismo ángulo. Así pues, no existe incompatibilidad de montaje cuello modular/cabeza femoral en cuanto se respetan el tipo y el ángulo. Sin embargo, no se recomienda el montaje de una cabeza a cuello extra largo con un cuello modular lateral/medial +10.5.


Las cabezas femorales metálicas y de cerámica existen en distintos diámetros y distintas longitudes de cuellos.


Todas las cabezas AMPLITUDE se adaptan sobre todos los cuellos cuyo cono Morse es del mismo tipo (ejemplos: 10/12, 12/14,...) y mismo ángulo (5° 43'). Así pues, no existe incompatibilidad de montaje vástago femoral/cabeza femoral y esto, cualesquiera que sean los tamaños/ modelos utilizados, en cuanto se respetan el tipo y el ángulo.

Sin embargo, la cabeza femoral INITIALE® sólo es funcionalmente compatible con los vástagos de la gama INITIALE®.

El montaje cabeza/inserto, o cabeza/cotilo monobloque, debe realizarse entre una cabeza y un inserto del mismo diámetro interior. Toda mezcla entre los tamaños está prohibida (por ejemplo: una cabeza de diámetro 28 mm. con un inserto de diámetro interior 32 mm.). No se recomienda el montaje de una cabeza a cuello extra largo con un inserto SATURNE® o un cotilo retentivo a cementar. Del mismo modo, la asociación de una cabeza femoral INITIALE® no debe ser realizada con un inserto SATURNE® o un cotilo retentivo. Los cotilos existen en distintas versiones con y sin cemento: monobloque/modular/doble movilidad.

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


ROBERTO ROBERTI
Dirección Técnica
M.N. 13.006


CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.



El montaje inserto/cotilo debe realizarse entre un inserto y un cotilo de mismo diámetro y modelo. Toda mezcla entre los tamaños está prohibida (por ejemplo: un inserto de diámetro exterior 52 mm. con un cotilo de diámetro interior 54 mm.). Toda mezcla entre los modelos está prohibida (por ejemplo: un inserto SATURNE® con un cotilo HORIZON®).

El fondo de cotilo está destinado a la reconstrucción del cotilo. La fijación sus-cotiloidea se realiza mediante tornillos para hueso cortical de Ø 4.5 ó 5 mm. y de un largo que varía de 20 a 65 mm. Las patas laterales de longitudes diferentes determinan una posición en anteversión de cerca de 20 grados. Existe una gama de fondo de cotilo derecho e izquierdo que puede recibir cotilos de Ø 40 a Ø 60 mm.

La placa trocarteriana está destinada a la osteosíntesis del gran trocánter.

Su fijación se realiza mediante hilos de cerclage.

El obturador diafisario de polietileno existe en un único tamaño. Deben introducirle a un nivel femoral conveniente antes de la inyección del cemento.

Un recubrimiento de superficie de HAP está presente sobre algunos implantes destinados a ser colocados sin cemento. Este recubrimiento puede ser asociado a un depósito de titanio en bajo capa.

La designación del producto médico puesta sobre el embalaje especifica si la fijación debe hacerse con o sin cemento.

5 - Los materiales:

Los materiales utilizados, mencionados en la etiqueta, para la fabricación de los dispositivos médicos implantables se ajustan a las normas internacionales en vigor.

- M25W (Z3CND 18.14.03) norma ISO 5832/1
- M30NW (Z6CNM21-09) norma ISO 5832/9
- TA6V ELI (aleación titanio) norma ISO 5832/3
- UHMW PE (polietileno) norma ISO 5834/1 & 2
- Cerámica (alúmina/Al₂O₃) norma ISO 6474
- Hidroxiapatita (HAP) norma ASTM F1185.

Nota: Los insertos de cerámica de alúmina no pueden ser combinados más que con cabezas femorales de cerámica de alúmina.

6 - Indicaciones:

- Afecciones de la articulación de la cadera debidas a una enfermedad degenerativa o congénita, inflamatoria o post-traumática.
- Secuelas de intervenciones anteriores, Prótesis Total de Cadera, osteotomía.


7 - Contraindicaciones:

- Embarazo
- Infecciones agudas o crónicas, locales o sistémicas.
- Calidad ósea que pueda comprometer la estabilidad del implante.
- Afecciones musculares, vasculares o neurológicas graves.
- Alergias a los materiales utilizados.

8 - Nota:

- Se deben unir con fuerza los componentes modulares. No montar ni desmontar varias veces los componentes modulares.
- Cuando se impacta una cabeza femoral o un inserto de cerámica, se debe utilizar un impactor de plástico.
- Se deben eliminar todos los cuerpos extraños (partículas de hueso, cemento, tejido...) antes de la implantación de elementos ensamblados mecánicamente. Éstos pueden causar un desgaste anormal de las superficies articuladas.
- Antes del cierre de la incisión, el cirujano debe cerciorarse de la correcta implantación de los diferentes componentes, de su buen funcionamiento unos en relación con otros y de su estabilidad.

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


Sra. MONICA L. ROSSI
Dirección Técnica
M.N. 13.505


CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.

**9 - Montaje de las piezas que forman el dispositivo médico implantable:**

Cuando monta las piezas provistas por AMPLITUDE, el cirujano ha de comprobar:

- La buena compatibilidad del conjunto de las piezas (compatibilidad de los diámetros, compatibilidad de los conos morse: sección, ángulo, pendiente, compatibilidad de los materiales: ej. Cerámica / cerámica
- Las recomendaciones de unión (ver técnica operatoria)

10 - Factores susceptibles de comprometer el éxito de la implantación:

Los pacientes deben ser informados de los factores susceptibles de comprometer el éxito de la intervención relacionada a la implantación de una Prótesis Total de Cadera:

- Sobrecarga ponderal.
- Anamnesia mostrando infecciones o caídas.
- Enfermedades metabólicas.
- Tumores óseos locales.
- Deformaciones óseas importantes.
- Osteoporosis grave.
- Práctica de deportes o actividades de riesgo.
- Conducta adictiva.

11 - Efectos indeseables:

Los principales efectos indeseables son los que se encuentran habitualmente en la implantación de una Prótesis Total de Cadera.

- Luxaciones.
- Infecciones
- Desgaste de las superficies articuladas.
- Movilización.
- Trombosis venosas y embolias pulmonares.
- Modificaciones de la estructura ósea alrededor del implante.
- Problemas cardiovasculares.
- Hematomas y dolores.

12 - Esterilidad/Mantenimiento:

Este dispositivo está suministrado estéril después de esterilización por radiación ionizante gamma a una dosis mínima de 25 kGy bajo doble acondicionamiento. Cualquier desesterilización accidental del producto implica la devolución a AMPLITUDE.

Los implantes, acondicionados en su embalaje, deben mantenerse en un lugar seco, sin luz y a temperatura no superior a 35°C. No deben ser expuestos a fuentes ionizantes.

Antes de abrir es imperativo verificar la integridad del embalaje con el fin de comprobar la ausencia de todo tipo de deterioro que pueda afectar la calidad del implante y su esterilidad. Se debe comprobar la fecha de caducidad.

Se debe prestar una particular atención a los dispositivos de cerámica, que no deben ser utilizados en caso de caída incluso en ausencia de daño aparente.

El dispositivo médico contenido en este embalaje es de un solo uso.

La reutilización de un producto médico de uso único puede tener graves consecuencias que pueden ir hasta la muerte del paciente operado.

Nunca hay que utilizar un implante deteriorado o ya utilizado.

En caso de una eventual ablación de este implante, debe ser destruido según la reglamentación en vigor.

13 - Informaciones complementarias:

Para efectuar la colocación de los implantes debe usarse un instrumental especial servido por la sociedad AMPLITUDE.

El cirujano debe ser consciente de que el éxito de la intervención que va a practicar tiene que ver con los conocimientos y la experiencia adquirida. Por tanto es necesario que de



antemano aprenda todos los aspectos técnicos y reglamentarios relativos a este dispositivo médico.

La sociedad AMPLITUDE se declara exenta de toda responsabilidad.

Conservación: conservar en lugar seco. No conservar a temperatura superior a 35 °C.
Los envases abiertos o deteriorados no deben utilizarse, No re-esterilizar


Dirección Técnica: Farm. Mónica Roberto MN 13305


Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 940-106



SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


Farm. MÓNICA ROBERTO
Dirección Técnica
M.N. 13305


CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OS S.O.U.F.E S.R.L.



**Proyecto de rótulos del Producto Médico
Según Anexo III.B de la Disp. 2318/02 (TO 2004)**

Modelo de rotulo

FABRICANTE: SOCIETE AMPLITUDE

DIRECCION: 11 Cours Jacques Offenbach, Zone Mozart 2, 26000 Valence, Francia.

IMPORTADOR: OSTEOLIFE S.R.L.

DIRECCION: Av. Belgrano 3031(CABA) Argentina

SISTEMA DE PROTESIS TOTAL DE CADERA E INSTRUMENTAL

Marca: **INTEGRALE®**, **LOGIC®**, **GENERIC®**, **NATURE®**, **EQUATEUR®**,
HORIZON®, **DELTA®**, **SATURNE®**, **ACOR®**, **INITIALE®**, **LUNA®**
EXTREME®, **OPTIMAL®**, **AMPLIVISION®**

Modelo: XXX

LOTE N° (DE ORIGEN)

FECHA DE FABRICACION (DE ORIGEN)

FECHA DE VENCIMIENTO (DE ORIGEN)

“ESTERIL”

PRODUCTO MEDICO DE UN SOLO USO

Verifique las instrucciones de uso con el folleto interno.

Conservación: conservar en lugar seco. No conservar a temperatura superior a 35 °C. (DE ORIGEN)

El material no debe de emplearse para nada más que para lo que está indicado. (de origen)


Los envases abiertos o deteriorados no deben utilizarse, No re-esterilizar (de origen)


Dirección Técnica: Farm. Mónica Roberto MN 13305

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 940-106

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


Farm. MONICA L. ROBERTO
Dirección Técnica
M.N. 13.305



CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.

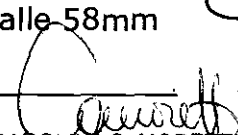
**XXX: NOTA:**

el presente rotulo es válido para los modelos listados a continuación:

- 1-0100101 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 1
- 1-0100102 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 2
- 1-0100103 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 3
- 1-0100104 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 4
- 1-0100105 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 5
- 1-0100106 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 6
- 1-0100107 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 7
- 1-0100108 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 8
- 1-0101701 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial - sin cemento Talle 1
- 1-0101702 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial - sin cemento Talle 2
- 1-0101703 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial - sin cemento Talle 3
- 1-0101704 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial - sin cemento Talle 4
- 1-0101705 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial - sin cemento Talle 5
- 1-0101706 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial - sin cemento Talle 6
- 1-0101707 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial - sin cemento Talle 7
- 1-0100201 Vástago femoral GENERIC® - para cementar Talle 1
- 1-0100202 Vástago femoral GENERIC® - para cementar Talle 2
- 1-0100203 Vástago femoral GENERIC® - para cementar Talle 3
- 1-0100204 Vástago femoral GENERIC® - para cementar Talle 4
- 1-0100205 Vástago femoral GENERIC® - para cementar Talle 5
- 1-0100206 Vástago femoral GENERIC® - para cementar Talle 6
- 1-0100207 Vástago femoral GENERIC® - para cementar Talle 7
- 1-0101301 Vástago femoral NATURE® - sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 1
- 1-0101302 Vástago femoral NATURE® - sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 2
- 1-0101303 Vástago femoral NATURE® - sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 3
- 1-0101304 Vástago femoral NATURE® - sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 4
- 1-0101305 Vástago femoral NATURE® - sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 5
- 1-0101306 Vástago femoral NATURE® - sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 6
- 1-0101307 Vástago femoral NATURE® - sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 7
- 1-0100540 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talla 40mm
- 1-0100542 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 42mm
- 1-0100544 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 44mm
- 1-0100546 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 46mm
- 1-0100548 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 48mm
- 1-0100550 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 50mm
- 1-0100552 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 52mm
- 1-0100554 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 54mm
- 1-0100556 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 56mm
- 1-0100558 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 58mm

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


 Srta. MONICA L. ROBERTO
 Dirección Técnica
 M.N. 13.305



 CAROLINA S. MORETTI
 APODERADA
 OSTEO LIFE S.R.L.



- 1-0100560 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 60mm
- 1-0100562 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 62mm
- 1-0100564 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 64mm
- 1-0100640 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talle 40mm
- 1-0100642 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 42mm
- 1-0100644 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 44mm
- 1-0100646 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 46mm
- 1-0100648 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 48mm
- 1-0100650 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 50mm
- 1-0100652 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 52mm
- 1-0100654 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 54mm
- 1-0100656 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 56mm
- 1-0100658 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 58mm
- 1-0100660 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 60mm
- 1-0100662 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 62mm
- 1-0100664 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 64mm
- 5-0100200 Tornillo obturador de fondo de cúpula
- 1-0100740 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 40/22
- 1-0100742 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 42/22
- 1-0100744 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 44/22
- 1-0100746 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 46/22
- 1-0100748 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 48/22
- 1-0100750 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 50/22
- 1-0100752 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 52/22
- 1-0100754 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 54/22
- 1-0100756 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 56/22
- 1-0100758 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 58/22
- 1-0100760 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 60/22
- 1-0100762 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 62/22
- 1-0100764 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 64/22
- 1-0100848 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 48/28
- 1-0100850 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 50/28
- 1-0100852 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 52/28
- 1-0100854 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 54/28
- 1-0100856 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 56/28
- 1-0100858 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 58/28
- 1-0100860 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 60/28
- 1-0100862 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 62/28
- 1-0100864 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 64/28
- 1-0100952 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 52/32
- 1-0100954 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 54/32
- 1-0100956 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 56/32
- 1-0100958 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 58/32
- 1-0100960 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 60/32
- 1-0100962 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 62/32
- 1-0100964 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 64/32
- 1-0101040 Inserto con reborde para Cotilo Talle 40/22
- 1-0101042 Inserto con reborde para Cotilo Talle 42/22

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos

arm. MONICA L. ROBERTI
Dirección Técnica
M.N. 13.305

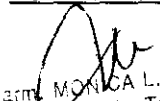

CAROLINA S. MOBETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.


0984



- 1-0101044 Inserto con reborde para Cotilo Talle 44/22
- 1-0101046 Inserto con reborde para Cotilo Talle 46/22
- 1-0101048 Inserto con reborde para Cotilo Talle 48/22
- 1-0101050 Inserto con reborde para Cotilo Talle 50/22
- 1-0101052 Inserto con reborde para Cotilo Talle 52/22
- 1-0101054 Inserto con reborde para Cotilo Talle 54/22
- 1-0101056 Inserto con reborde para Cotilo Talle 56/22
- 1-0101058 Inserto con reborde para Cotilo Talle 58/22
- 1-0101060 Inserto con reborde para Cotilo Talle 60/22
- 1-0101062 Inserto con reborde para Cotilo Talle 62/22
- 1-0101064 Inserto con reborde para Cotilo Talle 64/22
- 1-0101548 Inserto con reborde para Cotilo Talle 48/28
- 1-0101550 Inserto con reborde para Cotilo Talle 50/28
- 1-0101552 Inserto con reborde para Cotilo Talle 52/28
- 1-0101554 Inserto con reborde para Cotilo Talle 54/28
- 1-0101556 Inserto con reborde para Cotilo Talle 56/28
- 1-0101558 Inserto con reborde para Cotilo Talle 58/28
- 1-0101560 Inserto con reborde para Cotilo Talle 60/28
- 1-0101562 Inserto con reborde para Cotilo Talle 62/28
- 1-0101564 Inserto con reborde para Cotilo Talle 64/28
- 1-0101252 Inserto con reborde para Cotilo Talle 52/32
- 1-0101254 Inserto con reborde para Cotilo Talle 54/32
- 1-0101256 Inserto con reborde para Cotilo Talle 56/32
- 1-0101258 Inserto con reborde para Cotilo Talle 58/32
- 1-0101260 Inserto con reborde para Cotilo Talle 60/32
- 1-0101262 Inserto con reborde para Cotilo Talle 62/32
- 1-0101264 Inserto con reborde para Cotilo Talle 64/32
- 1-0101616 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 16 mm
- 1-0101620 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 20 mm
- 1-0101625 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 25 mm
- 1-0101630 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 30 mm
- 1-0101635 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 35 mm
- 1-0101640 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 40 mm
- 1-0101645 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 45 mm
- 1-0101650 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 50 mm
- 1-0101655 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 55 mm
- 1-0101660 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 60 mm
- 1-0101665 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 65 mm
- 1-0101838 Obturador diafisario
- 1-0101101 Cabeza femoral M30NW Ø 22.2 Cuello corto
- 1-0101102 Cabeza femoral M30NW Ø 22.2 Cuello mediano
- 1-0101103 Cabeza femoral M30NW Ø 22.2 Cuello largo
- 1-0101111 Cabeza femoral M30NW Ø 28 Cuello corto
- 1-0101112 Cabeza femoral M30NW Ø 28 Cuello mediano
- 1-0101113 Cabeza femoral M30NW Ø 28 Cuello largo
- 1-0101114 Cabeza femoral M30NW Ø 28 Cuello extra largo
- 1-0101121 Cabeza femoral M30NW Ø 32 Cuello corto
- 1-0101122 Cabeza femoral M30NW Ø 32 Cuello mediano

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


arm. MONICA L. ROBERTO
Dirección Técnica
M.N. 13.305

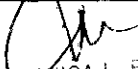

CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.

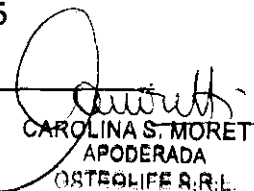


0984

- 1-0101123 Cabeza femoral M30NW Ø 32 Cuello largo
- 1-0101124 Cabeza femoral M30NW Ø 32 Cuello extra largo
- 1-0101131 Cabeza femoral M30NW Ø 26 Cuello corto
- 1-0101132 Cabeza femoral M30NW Ø 26 Cuello mediano
- 1-0101133 Cabeza femoral M30NW Ø 26 Cuello largo
- 1-0190701 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 22.2 Cuello corto
- 1-0190702 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 22.2 Cuello mediano
- 1-0190703 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 22.2 Cuello largo
- 1-0190711 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 28 Cuello corto
- 1-0190712 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 28 Cuello mediano
- 1-0190713 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 28 Cuello largo
- 1-0190714 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 28 Cuello extra largo
- 1-0190721 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 32 Cuello corto
- 1-0190722 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 32 Cuello mediano
- 1-0190723 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 32 Cuello largo
- 1-0190724 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 32 Cuello extra largo
- 1-0102248 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 48 para inserto cerámico
- 1-0102250 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 50 para inserto cerámico
- 1-0102252 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 52 para inserto cerámico
- 1-0102254 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 54 para inserto cerámico
- 1-0102256 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 56 para inserto cerámico
- 1-0102258 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 58 para inserto cerámico
- 1-0102260 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 60 para inserto cerámico
- 1-0102262 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 62 para inserto cerámico
- 1-0102264 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 64 para inserto cerámico
- 1-0102301 Inserto cerámico 36/28 para Cotilo Talle 48/28
- 1-0102302 Inserto cerámico 39/28 para Cotilo Talle 50/28 y 52/28
- 1-0102303 Inserto cerámico 41/28 para Cotilo Talle 54/28
- 1-0102304 Inserto cerámico 44/28 para Cotilo Talle 56 y 58/28
- 1-0102305 Inserto cerámico 48/28 para Cotilo Talle 60/28 y 62/28
- 1-0102306 Inserto cerámico 52/28 para Cotilo Talle 64/28
- 1-0102400 Inserto cerámico 39/32 para Cotilo Talle 50/32 y 52/32
- 1-0102401 Inserto cerámico 41/32 para Cotilo Talle 54/32
- 1-0102402 Inserto cerámico 44/32 para Cotilo Talle 56/32 y 58/32
- 1-0102403 Inserto cerámico 48/32 para Cotilo Talle 60/32 y 62/32
- 1-0102404 Inserto cerámico 52/32 para Cotilo Talle 64/32
- 1-0106900 Inserto cerámico 44/36 para Cotilo Talle 56/36 y 58/36
- 1-0106901 Inserto cerámico 48/36 para Cotilo Talle 60/36 y 62/36
- 1-0106902 Inserto cerámico 52/36 para Cotilo Talle 64/36

SOCIETÀ AMPLITUDE, Productos Médicos



arm. MONICA L. ROBERTI
Dirección Técnica
M.N. 13.305



CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.



- 1-0102711 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 28 mm
Cuello corto
1-0102712 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 28 mm
Cuello mediano
1-0102713 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 28 mm
Cuello largo
1-0102721 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 32 mm
Cuello corto
1-0102722 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 32 mm
Cuello mediano
1-0102723 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 32 mm
Cuello largo
1-0102731 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 36 mm
Cuello corto
1-0102732 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 36 mm
Cuello mediano
1-0102733 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 36 mm
Cuello largo
1-0190811 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 28 mm Cuello corto
1-0190812 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 28 mm Cuello
mediano
1-0190813 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 28 mm Cuello largo
1-0190821 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 32 mm Cuello corto
1-0190822 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 32 mm Cuello
mediano
1-0190823 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 32 mm Cuello largo
1-0190831 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 36 mm Cuello corto
1-0190832 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 36 mm Cuello
mediano
1-0190833 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 36 mm Cuello largo
1-0190911 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 28 mm Cuello corto
1-0190912 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 28 mm Cuello mediano
1-0190913 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 28 mm Cuello largo
1-0190921 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 32 mm Cuello corto
1-0190922 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 32 mm Cuello mediano
1-0190923 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 32 mm Cuello largo
1-0190924 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 32 mm Cuello extra largo
1-0190931 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 36 mm Cuello corto
1-0190932 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 36 mm Cuello mediano
1-0190933 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 36 mm Cuello largo
1-0190934 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 36 mm Cuello extra largo
1-0103444 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Taille 44
1-0103446 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Taille 46
1-0103448 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Taille 48
1-0103450 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Taille 50
1-0103452 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Taille 52
1-0103454 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Taille 54
1-0103456 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Taille 56

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos

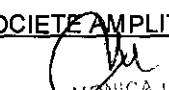

MÓNICA L. ROBERTO
Dirección Técnica
M.N. 13.305

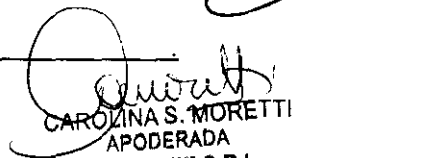

CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.



- 1-0103458 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Taille 58
- 1-0103460 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Taille 60
- 1-0103462 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Taille 62
- 1-0103464 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Taille 64
- 1-0103350 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Taille 50
- 1-0103352 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Taille 52
- 1-0103354 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Taille 54
- 1-0103356 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Taille 56
- 1-0103358 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Taille 58
- 1-0103360 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Taille 60
- 1-0103362 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Taille 62
- 1-0103364 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Taille 64
- 1-0103366 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Taille 66
- 1-0106244 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Taille 44
- 1-0106246 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Taille 46
- 1-0106248 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Taille 48
- 1-0106250 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Taille 50
- 1-0106252 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Taille 52
- 1-0106254 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Taille 54
- 1-0106256 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Taille 56
- 1-0106258 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Taille 58
- 1-0106260 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Taille 60
- 1-0106262 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Taille 62
- 1-0103644 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 44/22
- 1-0103646 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 46/22
- 1-0103648 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 48/22
- 1-0103650 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 50/22
- 1-0103652 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 52/22
- 1-0103654 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 54/22
- 1-0103656 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 56/22
- 1-0103658 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 58/22
- 1-0103660 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 60/22
- 1-0103662 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 62/22
- 1-0103664 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 64/22
- 1-0103666 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 66/22
- 0-0103748 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 48/2/
- 0-0103750 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 50/28
- 0-0103752 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 52/28
- 0-0103754 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Taille 54/28

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


Farm. MONICA L. HO
Dirección Técnica
M.N. 13.305


CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE R.R.L.



0-0103756 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 56/28
0-0103758 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 58/28
0-0103760 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 60/28
0-0103762 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 62/28
0-0103764 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 64/28
0-0103766 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 66/28
1-01066D1 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 1 derecho
1-01066D2 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 2 derecho
1-01066D3 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 3 derecho
1-01066D4 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 4 derecho
1-01066D5 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 5 derecho
1-01066D6 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 6 derecho
1-01066D7 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 7 derecho
1-01066G1 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 1 izquierdo
1-01066G2 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 2 izquierdo
1-01066G3 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 3 izquierdo
1-01066G4 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 4 izquierdo
1-01066G5 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 5 izquierdo
1-01066G6 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 6 izquierdo
1-01066G7 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 7 izquierdo
0-01070D1 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 1 derecho
0-01070D2 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 2 derecho
0-01070D3 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 3 derecho
0-01070D4 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 4 derecho
0-01070D5 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 5 derecho
0-01070D6 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 6 derecho
0-01070D7 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 7 derecho

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos

Dr. MONICA C. ROBERTO
Dirección Técnica
M.N. 13.305

CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.




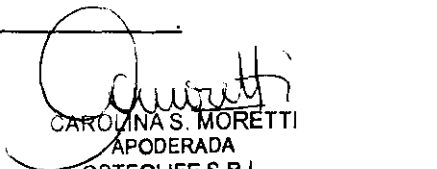
- 0-01070G1 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 1 izquierdo
- 0-01070G2 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 2 izquierdo
- 0-01070G3 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 3 izquierdo
- 0-01070G4 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 4 izquierdo
- 0-01070G5 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 5 izquierdo
- 0-01070G6 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 6 izquierdo
- 0-01070G7 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar
Talle 7 izquierdo
- 1-0106701 Cuello modular Lateral / Medial 10/12
- 1-0106702 Cuello modular Anterior / Retraído 8° 10/12
- 1-0106703 Cuello modular Lateral plus / Medial plus 10/12
- 1-0106704 Cuello modular Lateral / Medial 10/12 + 10.5
- 1-0106705 Cuello modular Lateral / Medial 10/12 + 7
- 1-0107101 Cuello modular Lateral / Medial 12/14
- 1-0107102 Cuello modular Lateral plus / Medial plus 12/14
- 1-0107103 Cuello modular Anterior / Retraído 8° 12/14
- 1-0107104 Cuello modular Lateral / Medial 12/14 + 10.5
- 1-0191001 Cuello modular Lateral / Medial 12/14
- 1-0191002 Cuello modular Lateral plus / Medial plus 12/14
- 1-0191003 Cuello modular Anterior / Retraído 8° 12/14
- 1-0191004 Cuello modular Lateral / Medial 12/14 + 10.5
- 1-0106502 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle
2
- 1-0106503 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle
3
- 1-0106504 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle
4
- 1-0106505 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle
5
- 1-0106506 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle
6
- 1-0106507 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle
7
- 1-0190101 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 101S
- 1-0190102 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 102S
- 1-0190201 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 201S
- 1-0190202 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 202S
- 1-0190203 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 203S
- 1-0190301 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 301S
- 1-0190302 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 302S
- 1-0190303 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 303S
- 1-0190401 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 401S



1-0190402 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 402S
1-0190403 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 403S
1-0190501 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 501S
1-0190502 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 502S
1-0190601 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 601S
1-0190602 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 602S
1-0180102 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 101S
1-0180102 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 102S
1-0180201 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 201S
1-0180202 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 202S
1-0180203 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 203S
1-0180301 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 301S
1-0180302 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 302S
1-0180303 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 303S
1-0180401 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 401S
1-0180402 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 402S
1-0180403 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 403S
1-0180501 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 501S
1-0180502 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 502S
1-0180601 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 601S
1-0180602 Prótesis femoral INITIALE® N° 602S
1-0104800 Cabeza Femoral INITIALE® -3
1-0104801 Cabeza Femoral INITIALE® 0
1-0104802 Cabeza Femoral INITIALE® +4
1-0150121 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 121 D
1-0150221 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 221 D
1-0150321 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 321 D
1-0150421 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 421 D
1-0150521 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 521 D
1-0150511 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 511 D
1-0150531 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 531 D
1-0140121 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 121 D
1-0140221 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 221 D
1-0140321 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 321 D
1-0140421 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 421 D
1-0140521 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 521 D
1-0170220 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 202 Ig.
200 mm
1-0170225 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 202 Ig.
250 mm
1-0170230 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 202 Ig.
300 mm
1-0170235 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 202 Ig.
350 mm
1-0170320 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 302 Ig.
200 mm
1-0170325 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 302 Ig.
250 mm

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos



Sra. MONICA L. ROBERTO
Dirección Técnica
M.N. 13.305

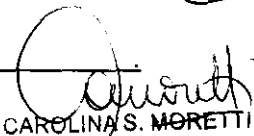

CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.



- 1-0170330 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 302 Ig.
300 mm
- 1-0170335 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 302 Ig.
350 mm
- 1-0170420 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 402 Ig.
200 mm
- 1-0170425 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 402 Ig.
250 mm
- 1-0170430 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 402 Ig.
300 mm
- 1-0170435 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 402 Ig.
350 mm
- 1-0170520 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 501 Ig.
200 mm
- 1-0170525 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 501 Ig.
250 mm
- 1-0170530 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 501 Ig.
300 mm
- 1-0170535 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 501 Ig.
350 mm
- 1-0160220 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 202 Ig.
200 mm
- 1-0160225 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 202 Ig.
250 mm
- 1-0160230 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 202 Ig.
300 mm
- 1-0160235 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 202 Ig.
350 mm
- 1-0160320 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 302 Ig.
200 mm
- 1-0160325 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 302 Ig.
250 mm
- 1-0160330 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 302 Ig.
300 mm
- 1-0160335 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 302 Ig.
350 mm
- 1-0160420 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 402 Ig.
200 mm
- 1-0160425 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 402 Ig.
250 mm
- 1-0160430 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 402 Ig.
300 mm
- 1-0160435 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 402 Ig.
350 mm
- 1-0160520 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 501 Ig.
200 mm
- 1-0160525 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 501 Ig.
250 mm

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos



MÓNICA L. ROBERTI
Dirección Técnica
M.N. 13.305

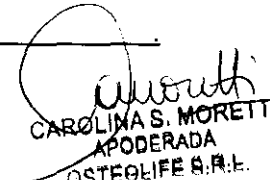

CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.



- 1-0160530 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 501 Ig.
300 mm
- 1-0160535 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 501 Ig.
350 mm
- 1-0105440 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/37/40
- 1-0105442 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/38.5/42
- 1-0105444 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/40/44
- 1-0105446 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/41.5/46
- 1-0105448 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/43/48
- 1-0105450 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/44.5/50
- 1-0105452 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/46/52
- 1-0105454 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/47.5/54
- 1-0105456 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/49/56
- 1-0105458 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/51/58
- 1-0105460 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2 /53/60
- 1-0104748 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/43/48
- 1-0104750 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/44.5/50
- 1-0104752 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/46/52
- 1-0104754 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/47.5/54
- 1-0104756 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/49/56
- 1-0104758 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/51/58
- 1-0104760 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/53/60
- 1-0101940 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano
Talle 40/22
- 1-0101942 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano
Talle 42/22
- 1-0101944 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano
Talle 44/22
- 1-0101946 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano
Talle 46/22
- 1-0101948 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano
Talle 48/22
- 1-0101950 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano
Talle 50/22
- 1-0101952 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano
Talle 52/22
- 1-0101954 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano
Talle 54/22
- 1-0101956 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano
Talle 56/22
- 1-0101958 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano
Talle 58/22
- 1-0101960 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano
Talle 60/22
- 1-0101962 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano
Talle 62/22
- 1-0101964 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano
Talle 64/22

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos



Dra. MONICA L. ROBERTO
Dirección Técnica
M.N. 13.305


CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEO LIFE S.R.L.



- 1-0102044 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 44/28
- 1-0102046 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 46/28
- 1-0102048 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 48/28
- 1-0102050 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 50/28
- 1-0102052 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 52/28
- 1-0102054 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 54/28
- 1-0102056 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 56/28
- 1-0102058 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 58/28
- 1-0102060 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 60/28
- 1-0102062 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 62/28
- 1-0102064 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 64/28
- 1-0102148 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 48/32
- 1-0102150 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 50/32
- 1-0102152 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 52/32
- 1-0102154 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 54/32
- 1-0102156 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 56/32
- 1-0102158 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 58/32
- 1-0102160 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 60/32
- 1-0102162 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 62/32
- 1-0102164 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 64/32
- 1-0102840 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 40/22
- 1-0102842 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 42/22
- 1-0102844 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 44/22
- 1-0102846 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 46/22

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos



Dra. MONICA L. ROBERTI
Dirección Técnica
M.N. 13.305

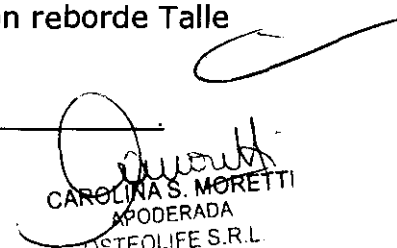

CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.

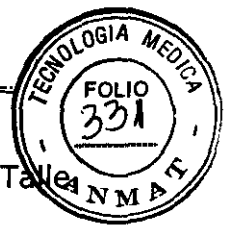


- 1-0102848 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 48/22
1-0102850 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 50/22
1-0102852 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 52/22
1-0102854 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 54/22
1-0102856 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 56/22
1-0102858 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 58/22
1-0102860 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 60/22
1-0102862 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 62/22
1-0102864 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 64/22
1-0102944 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 44/28
1-0102946 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 46/28
1-0102948 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 48/28
1-0102950 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 50/28
1-0102952 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 52/28
1-0102954 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 54/28
1-0102956 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 56/28
1-0102958 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 58/28
1-0102960 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 60/28
1-0102962 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 62/28
1-0102964 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 64/28
1-0103048 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 48/32
1-0103050 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 50/32
1-0103052 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 52/32
1-0103054 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 54/32

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos

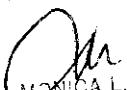

Farm. MONICA L. ROBERTI
Dirección Técnica
M.N. 13.805

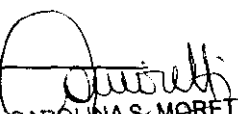

CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.



- 1-0103056 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 56/32
1-0103058 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 58/32
1-0103060 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 60/32
1-0103062 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 62/32
1-0103064 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 64/32
0-0103140 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 37/40 D. EXT 44
0-0103144 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 40/44 D. EXT 48
0-0103148 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 43/48 D. EXT 52
0-0103152 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 46/52 D. EXT 56
0-0103156 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 49/56 D. EXT 60
0-0103160 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 53/60 D. EXT 64
0-0103240 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 37/40 D. EXT 44
0-0103244 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 40/44 D. EXT 48
0-0103248 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 43/48 D. EXT 52
0-0103252 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 46/52 D. EXT 56
0-0103256 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 49/56 D. EXT 60
0-0103260 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 53/60 D. EXT 64
0-0105001 Gancho para trocánter derecho largo 90 mm
0-0105002 Gancho para trocánter derecho largo 100 mm
0-0105101 Gancho para trocánter izquierdo largo 90 mm
0-0105102 Gancho para trocánter izquierdo largo 100 mm
1-0105201 Placa trocantérica largo 70 mm
1-0105202 Placa trocantérica largo 85 mm
1-0105203 Placa trocantérica largo 100 mm
1-0105301 Placa trocantérica con patas laterales largo 70 mm
1-0105302 Placa trocantérica con patas laterales largo 85 mm
1-0105303 Placa trocantérica con patas laterales largo 100 mm
1-0105512 Hilo de cerclaje 12/10 largo 550 mm (acondicionamiento 10 artículos)
1-0105514 Hilo de cerclaje 14/10 largo 550 mm (acondicionamiento 10 artículos)
1-0105712 Hilo de cerclaje 12/10 largo 550 mm (acondicionamiento 1 artículo)
1-0105714 Hilo de cerclaje 14/10 largo 550 mm (acondicionamiento 1 artículo)
1-0102540 Cúpula intermedia Talle 40/22
1-0102542 Cúpula intermedia Talle 42/22
1-0102544 Cúpula intermedia Talle 44/22
1-0102546 Cúpula intermedia Talle 46/22
1-0102548 Cúpula intermedia Talle 48/22
1-0102550 Cúpula intermedia Talle 50/22
1-0102552 Cúpula intermedia Talle 52/22
1-0102554 Cúpula intermedia Talle 54/22

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


MONICA L. ROBERT
Dirección Técnica
M.N. 13.305

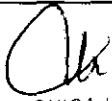

CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.




0984

- 1-0102556 Cúpula intermedia Talle 56/28
 1-0102648 Cúpula intermedia Talle 48/28
 1-0102650 Cúpula intermedia Talle 50/28
 1-0102652 Cúpula intermedia Talle 52/28
 1-0102654 Cúpula intermedia Talle 54/28
 1-0102656 Cúpula intermedia Talle 56/28
 1-0102658 Cúpula intermedia Talle 58/28
 1-0102660 Cúpula intermedia Talle 60/28
 1-0102662 Cúpula intermedia Talle 62/28
 1-0102664 Cúpula intermedia Talle 64/28
 1-0106344 Cótulo retentivo para cementar Talle 44/28
 1-0106346 Cótulo retentivo para cementar Talle 46/28
 1-0106348 Cótulo retentivo para cementar Talle 48/28
 1-0106350 Cótulo retentivo para cementar Talle 50/28
 1-0106352 Cótulo retentivo para cementar Talle 52/28
 1-0106354 Cótulo retentivo para cementar Talle 54/28
 1-0106356 Cótulo retentivo para cementar Talle 56/28
 1-0106358 Cótulo retentivo para cementar Talle 58/28
 1-0100301 Vástago femoral de revisión INTEGRAL® Talle 1
 1-0100302 Vástago femoral de revisión INTEGRAL® Talle 2
 1-0100303 Vástago femoral de revisión INTEGRAL® Talle 3
 1-0100304 Vástago femoral de revisión INTEGRAL® Talle 4
 1-0100305 Vástago femoral de revisión INTEGRAL® Talle 5
 1-0100306 Vástago femoral de revisión INTEGRAL® Talle 6
 1-0100307 Vástago femoral de revisión INTEGRAL® Talle 7
 1-0100308 Vástago femoral de revisión INTEGRAL® Talle 8
 1-0100401 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 1
 1-0100402 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 2
 1-0100403 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 3
 1-0100404 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 4
 1-0100405 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 5
 1-0100406 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 6
 1-0100407 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 7
 0-0103801 Metáfisis estándar EXTREME® con HAP - Talle 1
 0-0103802 Metáfisis estándar EXTREME® con HAP - Talle 2
 0-0103803 Metáfisis estándar EXTREME® con HAP - Talle 3
 0-0103804 Metáfisis estándar EXTREME® con HAP - Talle 4
 0-0104101 Epífisis EXTREME® - Talle 1
 0-0104102 Epífisis EXTREME® - Talle 2
 0-0104103 Epífisis EXTREME® - Talle 3
 0-0104104 Epífisis EXTREME® - Talle 4
 0-0104201 Epífisis EXTREME® - Talle 1 con collarete
 0-0104202 Epífisis EXTREME® - Talle 2 con collarete
 0-0104203 Epífisis EXTREME® - Talle 3 con collarete
 0-0104204 Epífisis EXTREME® - Talle 4 con collarete
 0-0107201 Epífisis-Metáfisis monobloc EXTREME® con HAP - Talle 1
 0-0107202 Epífisis-Metáfisis monobloc EXTREME® con HAP - Talle 2
 0-0107203 Epífisis-Metáfisis monobloc EXTREME® con HAP - Talle 3

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos



 Farm. MONICA L. ROBERT
 Dirección Técnica
 M.N. 13.305


 CAROLINA S. MORETTI
 APODERADA
 OSTEOLIFE S.R.L.



- 0-0107204 Epífisis-Metáfisis monobloc EXTREME® con HAP – Talle 4
1-0104301 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 10 largo 250 mm
1-0104302 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 10 largo 300 mm
1-0104303 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 10 largo 350 mm
1-0104311 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 12 largo 250 mm
1-0104312 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 12 largo 300 mm
1-0104313 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 12 largo 350 mm
1-0104314 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 12 largo 400 mm
1-0104321 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 14 largo 250 mm
1-0104322 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 14 largo 300 mm
1-0104323 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 14 largo 350 mm
1-0104324 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 14 largo 400 mm
1-0104331 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 16 largo 250 mm
1-0104332 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 16 largo 300 mm
1-0104333 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 16 largo 350 mm
1-0104334 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 16 largo 400 mm
1-0104341 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 18 largo 250 mm
1-0104342 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 18 largo 300 mm
1-0104343 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 18 largo 350 mm
1-0104344 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 18 largo 400 mm
1-0104351 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 20 largo 250 mm
1-0104352 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 20 largo 300 mm
1-0104353 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 20 largo 350 mm
1-0104354 Clavo diafisario EXTREME® con HAP – Ø 20 largo 400 mm
1-0105611 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento – Ø 12 largo 250 mm
1-0105612 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento – Ø 12 largo 300 mm
1-0105613 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento – Ø 12 largo 350 mm
1-0105621 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento – Ø 14 largo 250 mm
1-0105622 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento – Ø 14 largo 300 mm
1-0105623 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento – Ø 14 largo 350 mm
0-0106811 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 12 largo 250 mm
0-0106812 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 12 largo 300 mm
0-0106821 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 14 largo 250 mm
0-0106822 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 14 largo 300 mm
0-0106831 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 16 largo 250 mm
0-0106832 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 16 largo 300 mm

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos



Dra. MONICA L. ROBERTI
Dirección Técnica
M.N. 13.305



CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.



- 0-0104420 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 20 mm
- 0-0104425 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 25 mm
- 0-0104430 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 30 mm
- 0-0104435 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 35 mm
- 0-0104440 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 40 mm
- 0-0104445 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 45 mm
- 0-0104450 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 50 mm
- 0-0104455 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 55 mm
- 0-0104460 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 60 mm
- 0-0104465 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 65 mm
- 0-0104470 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 70 mm
- 0-0104475 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 75 mm
- 0-0104480 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 80 mm
- 1-01073R1 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 1 lado derecho Ø 12 lg 200 mm
- 1-01073R2 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 2 lado derecho Ø 12 lg 200 mm
- 1-01073R3 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 3 lado derecho Ø 12 lg 200 mm
- 1-01076R3 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 3 lado derecho Ø 14 lg 200 mm
- 1-01073R4 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 4 lado derecho Ø 14 lg 200 mm
- 1-01073R5 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 5 lado derecho Ø 16 lg 200 mm
- 1-01073L1 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 1 lado izquierdo Ø 12 lg 200 mm
- 1-01073L2 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 2 lado izquierdo Ø 12 lg 200 mm
- 1-01073L3 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 3 lado izquierdo Ø 12 lg 200 mm
- 1-01076L3 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 3 lado izquierdo Ø 14 lg 200 mm
- 1-01073L4 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 4 lado izquierdo Ø 14 lg 200 mm
- 1-01073L5 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 5 lado izquierdo Ø 16 lg 200 mm
- 1-01074R1 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 1 lado derecho Ø 12 lg 250 mm
- 1-01074R2 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 2 lado derecho Ø 12 lg 250 mm
- 1-01074R3 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 3 lado derecho Ø 12 lg 250 mm
- 1-01077R3 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 3 lado derecho Ø 14 lg 250 mm
- 1-01074R4 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 4 lado derecho Ø 14 lg 250 mm

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos

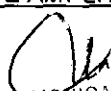

firm. MONICA L. Tronchetti
Dirección Técnica
M.N. 13.305

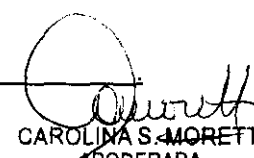

CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.

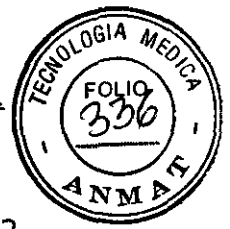


- 1-01074R5 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 5 lado derecho Ø 16 lg 250 mm
1-01074L1 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 1 lado izquierdo Ø 12 lg 250 mm
1-01074L2 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 2 lado izquierdo Ø 12 lg 250 mm
1-01074L3 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 3 lado izquierdo Ø 12 lg 250 mm
1-01077L3 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 3 lado izquierdo Ø 14 lg 250 mm
1-01074L4 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 4 lado izquierdo Ø 14 lg 250 mm
1-01074L5 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 5 lado izquierdo Ø 16 lg 250 mm
1-0107530 Chaveta de cierre para vástago OPTIMAL ® largo 30 mm
1-0107535 Chaveta de cierre para vástago OPTIMAL ® largo 35 mm
1-0107540 Chaveta de cierre para vástago OPTIMAL ® largo 40 mm
1-0107545 Chaveta de cierre para vástago OPTIMAL ® largo 45 mm
2-0100201 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 1
2-0100202 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 2
2-0100203 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 3
2-0100204 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 4
2-0100205 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 5
2-0100206 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 6
2-0100207 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 7
2-0100208 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 8
2-0100412 Cabeza de ensayo para vástago Ø 26 Cuello corto
2-0100414 Cabeza de ensayo para vástago Ø 26 Cuello largo
2-0100501 Cuello de ensayo Ø 28 Cuello corto
2-0100502 Cuello de ensayo Ø 28 Cuello mediano
2-0100503 Cuello de ensayo Ø 28 Cuello largo
2-0100504 Cuello de ensayo Ø 28 Cuello extra largo
2-0100505 Cuello de ensayo Ø 22.2 Cuello corto
2-0100506 Cuello de ensayo Ø 22.2 Cuello mediano
2-0100507 Cuello de ensayo Ø 22.2 Cuello largo
2-0100508 Cuello de ensayo Ø 32 Cuello corto
2-0100509 Cuello de ensayo Ø 32 Cuello mediano
2-0100510 Cuello de ensayo Ø 32 Cuello largo
2-0100511 Cuello de ensayo Ø 32 Cuello extra largo
2-0201000 Llave de agarre universal
2-0101400 Percutor de cabeza Ø 22.2
2-0103100 Manga porta raspador
2-0102900 Vástago para masa deslizante
2-0103200 Extremidad para masa deslizante de vástago femoral
2-0103300 Cilindro para masa deslizante
2-0114000 Perno suave Ø 2 A/P
2-0103500 Porta escariador
2-0103700 Trocanterómetro

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos



Farm. MONICA L. ROBERTO
Dirección Técnica
M.N. 13.305

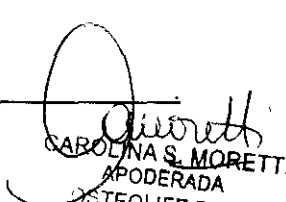

CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.

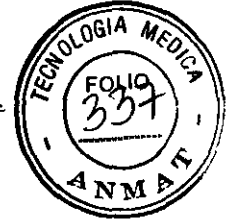


2-0114200 Percutor de cabeza Ø28 y Ø32 0984
2-0101352 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 52/32
2-0101354 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 54/32
2-0101356 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 56/32
2-0101358 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 58/32
2-0101360 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 60/32
2-0101362 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 62/32
2-0101364 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 64/32
2-0101640 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 40/22
2-0101642 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 42/22
2-0101644 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 44/22
2-0101646 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 46/22
2-0101648 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 48/22
2-0101650 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 50/22
2-0101652 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 52/22
2-0101654 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 54/22
2-0101656 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 56/22
2-0101658 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 58/22
2-0101660 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 60/22
2-0101662 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 62/22
2-0101664 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 64/22
2-0101748 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 48/28
2-0101750 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 50/28
2-0101752 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 52/28
2-0101754 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 54/28
2-0101756 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 56/28
2-0101758 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 58/28
2-0101760 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 60/28
2-0101762 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 62/28
2-0101764 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 64/28
2-0101852 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 52/32
2-0101854 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 54/32
2-0101856 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 56/32
2-0101858 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 58/32
2-0101860 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 60/32
2-0101862 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 62/32
2-0101864 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 64/32
2-0102200 Guía de perforación para broca Ø 3.2
2-0102100 Destornillador de cardan H 3.5
2-0102700 Medidor de tornillo
2-0102800 Pinza porta tornillo
2-0104000 Pinza porta tornillo de fondo de cúpula
2-0104140 Cúpula de ensayo Talle 40
2-0104142 Cúpula de ensayo Talle 42
2-0104144 Cúpula de ensayo Talle 44
2-0104146 Cúpula de ensayo Talle 46
2-0104148 Cúpula de ensayo Talle 48
2-0104150 Cúpula de ensayo Talle 50

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


Sra. MONICA L. MORETTI
Dirección Técnica
M.N. 13.305


CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.



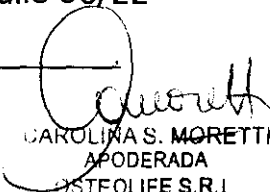
2-0100152 Cúpula de ensayo Talle 52
 2-0100154 Cúpula de ensayo Talle 54
 2-0100156 Cúpula de ensayo Talle 56
 2-0100158 Cúpula de ensayo Talle 58
 2-0100160 Cúpula de ensayo Talle 60
 2-0100162 Cúpula de ensayo Talle 62
 2-0100164 Cúpula de ensayo Talle 64
 2-0100722 Percutor de núcleo con borde plano \varnothing 22.2
 2-0100728 Percutor de núcleo con borde plano \varnothing 28
 2-0100732 Percutor de núcleo con borde plano \varnothing 32
 2-0101922 Percutor de núcleo con reborde \varnothing 22.2
 2-0101928 Percutor de núcleo con reborde \varnothing 28
 2-0101932 Percutor de núcleo con reborde \varnothing 32
 2-0101500 Destornillador derecho H3.5
 2-0101140 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 40/22
 2-0101142 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 42/22
 2-0101144 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 44/22
 2-0101146 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 46/22
 2-0101148 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 48/22
 2-0101150 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 50/22
 2-0101152 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 52/22
 2-0101154 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 54/22
 2-0101156 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 56/22
 2-0101158 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 58/22
 2-0101160 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 60/22
 2-0101162 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 62/22
 2-0101164 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 64/22
 2-0101248 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 48/28
 2-0101250 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 50/28
 2-0101252 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 52/28
 2-0101254 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 54/28
 2-0101256 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 56/28
 2-0101258 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 58/28
 2-0101260 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 60/28
 2-0101262 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 62/28
 2-0101264 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 64/28
 2-0102400 Broca \varnothing 3.2 largo 145 mm
 2-0103800 Broca corta \varnothing 3.2 largo 35 mm
 2-0102500 Broca corta \varnothing 3.2 largo 50 mm
 2-0102600 Broca larga \varnothing 3.2 largo 70 mm
 2-0103400 Introdutor de obturador diafisario
 2-0104401 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 48/28
 2-0104402 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 50/28 y 52/28
 2-0104403 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 54/28
 2-0104404 Inserto de ensayo de cerámica - cerámica Talle 56/28 y 58/28



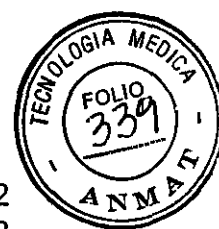
- 2-0104405 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 60/28 y 62/28
2-0104406 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 64/28
2-0104501 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 54/32
2-0104502 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 56/32 y 58/32
2-0104503 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 60/32 y 62/32
2-0104504 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 64/32
2-0118100 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 50/32 y 52/32
2-0116501 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 56/36 y 58/36
2-0116502 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 60/36 y 62/36
2-0116503 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 64/36
2-0100415 Cabeza de ensayo para vástago Ø36 Cuello corto
2-0100416 Cabeza de ensayo para vástago Ø36 Cuello mediano
2-0100417 Cabeza de ensayo para vástago Ø36 Cuello largo
2-0100512 Cuello de ensayo Ø 36 Cuello corto
2-0100513 Cuello de ensayo Ø 36 Cuello mediano
2-0100514 Cuello de ensayo Ø 36 Cuello largo
2-0100612 Cuello de ensayo de revisión Ø 36 Cuello corto
2-0100613 Cuello de ensayo de revisión Ø 36 Cuello mediano
2-0100614 Cuello de ensayo de revisión Ø 36 Cuello largo
2-0104136 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 36
2-0104336 Extremidad para agarre de cabeza femoral Ø 36
2-0100148 Cúpula de ensayo Talle 48
2-0100150 Cúpula de ensayo Talle 50
2-0100800 Percutor de cúpula
2-0102200 Guía de perforación para broca Ø3.2
2-0102800 Pinza para tornillo
2-0104128 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 28
2-0104132 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 32
2-0107600 Percutor extractor de inserto de cerámica
2-0102400 Broca Ø 3.2 largo 145 mm
2-0103800 Broca larga Ø 3.2 largo 35 mm
2-0102500 Broca larga Ø 3.2 largo 50 mm
2-0102600 Broca larga Ø 3.2 largo 70 mm
2-0102300 Árbol flexible para broca Ø 3.2
2-0105644 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 44/22
2-0105646 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 46/22
2-0105648 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 48/22
2-0105650 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 50/22
2-0105652 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 52/22
2-0105654 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 54/22
2-0105656 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 56/22
2-0105658 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 58/22

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


Dra. MONICA L. MORETTI
Dirección Técnica
M.N. 13.905

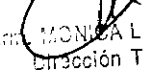

CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.

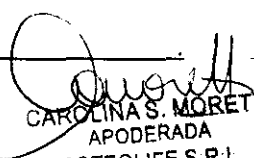
0984



2-0105660 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 60/22
 2-0105662 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 62/22
 2-0105664 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 64/22
 2-0105666 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 66/22
 2-0105748 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 48/28
 2-0105750 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 50/28
 2-0105752 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 52/28
 2-0105754 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 54/28
 2-0105756 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 56/28
 2-0105758 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 58/28
 2-0105760 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 60/28
 2-0105762 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 62/28
 2-0105764 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 64/28
 2-0105766 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 66/28
 2-0107600 Extractor de inserto
 2-0105844 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 44
 2-0105846 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 46
 2-0105848 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 48
 2-0105850 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 50
 2-0105852 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 52
 2-0105854 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 54
 2-0105856 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 56
 2-0105858 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 58
 2-0105860 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 60
 2-0105862 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 62
 2-0105864 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 64
 2-0105866 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 66
 2-0105900 Prensa para Cotilo doble movilidad
 2-0106100 Zócalo de mesa para prensa doble movilidad
 2-0106400 Extremidad 6 lados H3 para llave universal
 2-0106500 Extractor de inserto doble movilidad
 2-0107000 Reductor de inserto doble movilidad
 2-0107700 Percutor de bomba para cúpula doble movilidad
 2-0107800 Manga para percutor doble movilidad
 2-0116700 Extensión para percutor doble movilidad
 2-0205500 Llave para atornillar
 2-0108144 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 44
 2-0108146 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 46
 2-0108148 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 48
 2-0108150 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 50
 2-0108152 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 52
 2-0108154 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 54
 2-0108156 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 56
 2-0108158 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 58
 2-0108160 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 60
 2-0108162 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 62
 2-0108164 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 64
 2-0108166 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 66

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


 Dra. MONICA L. ROBERTI
 Dirección Técnica
 M.N. 13.305



 CAROLINA S. MORETTI
 APODERADA
 OSTEOLIFE S.R.L.




0984

- 2-0191044 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 44
 2-0191046 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 46
 2-0191048 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 48
 2-0191050 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 50
 2-0191052 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 52
 2-0191054 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 54
 2-0191056 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 56
 2-0191058 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 58
 2-0191060 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 60
 2-0191062 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 62
 2-0191064 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 64
 2-0191066 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 66
 2-0191100 Alargador para percutor de bomba
 2-0192100 Manga para percutor doble movilidad de navegación
 2-0108900 Herramienta de contorno
 2-0111400 Percutor final de cúpula doble movilidad
 2-0112400 Horquilla INITIALE para prensa doble movilidad
 2-0113100 Horquilla 12/14 para prensa doble movilidad
 2-0106900 Extractor de cúpula
 2-0107600 Percutor extractor de inserto de cerámica
 2-0108200 Broca AO Ø largo 145 mm
 2-0190700 Cuerpo percutor de cúpula
 2-0190840 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 40
 2-0190842 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 42
 2-0190844 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 44
 2-0190846 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 46
 2-0190848 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 48
 2-0190850 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 50
 2-0190852 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 52
 2-0190854 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 54
 2-0190856 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 56
 2-0190858 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 58
 2-0190860 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 60
 2-0190862 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 62
 2-0190864 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 64
 2-0116800 Palpador de navegación para cadera
 2-0117700 Soporte G para navegación vástago décubitis lateral
 2-0117701 Soporte G para navegación vástago décubitis dorsal
 2-0193401 Soporte G para navegación vástago décubitis Anterior Der. /
 Posterior Izq.
 2-0193402 Soporte G para navegación vástago décubitis Anterior Izq. /
 Anterior Der.
 2-0117801 Manga porta raspador curvo de navegación
 2-0117100 Sistema de fijación derecho para geometría de navegación
 2-0117200 Sistema de fijación inclinado para geometría de navegación
 2-0117300 Cuerpo rígido I cresta iliaca para navegación
 2-0117400 Cuerpo rígido F fémur para navegación
 2-0117500 Cuerpo rígido G instrumentación para navegación

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


 MÓNICA L. ROBERT
 Dirección Técnica
 M.N. 13.305



 CAROLINA S. MORETTI
 APODERADA
 OSTEOLIFE S.R.L.

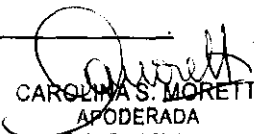
0984



- 2-0117600 Llave de agarre universal para navegación
- 2-0208700 Seguro para fijación Ø4 largo 150 mm
- 2-0208702 Seguro para fijación Ø4 largo 100 mm
- 2-0101200 Bloqueo AO para broca auto perforante
- 2-0192500 Porta fresa IMA mecánica / para navegación
- 2-0192940 Fresa para Cotilo Ø 40
- 2-0192944 Fresa para Cotilo Ø 44
- 2-0192946 Fresa para Cotilo Ø 46
- 2-0192948 Fresa para Cotilo Ø 48
- 2-0192950 Fresa para Cotilo Ø 50
- 2-0192952 Fresa para Cotilo Ø 52
- 2-0192954 Fresa para Cotilo Ø 54
- 2-0192956 Fresa para Cotilo Ø 56
- 2-0192958 Fresa para Cotilo Ø 58
- 2-0192960 Fresa para Cotilo Ø 60
- 2-0192962 Fresa para Cotilo Ø 62
- 2-0192964 Fresa para Cotilo Ø 64
- 2-0192966 Fresa para Cotilo Ø 66
- 2-01156D1 Raspador talla 1 derecho para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156D2 Raspador talla 2 derecho para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156D3 Raspador talla 3 derecho para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156D4 Raspador talla 4 derecho para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156D5 Raspador talla 5 derecho para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156D6 Raspador talla 6 derecho para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156D7 Raspador talla 7 derecho para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156G1 Raspador talla 1 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156G2 Raspador talla 2 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156G3 Raspador talla 3 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156G4 Raspador talla 4 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156G5 Raspador talla 5 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156G6 Raspador talla 6 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156G7 Raspador talla 7 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-0115700 Extremidad esférica H.5
- 2-0115900 Percutor de vástago femoral modular

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


CAROLINA S. MORETTI
Dirección Técnica
M.N. 13.305



CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.


0984



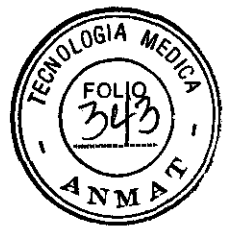
- 2-0116000 Extractor de vástago femoral modular
- 2-0116300 Herramienta sacabocado
- 2-0116900 Manga porta raspador derecho para navegación
- 2-0116101 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral / medial 10/12
- 2-0116102 Cuello de ensayo modular para vástago Anterior / Retraído 8° 10/12
- 2-0116103 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral plus / medial plus 10/12
- 2-0116104 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral / medial +7 10/12
- 2-0116105 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral / medial +10.5 10/12
- 2-0116401 Cuello de ensayo modular para raspador - LATERAL 10/12
- 2-0116402 Cuello de ensayo modular para raspador - MEDIAL 10/12
- 2-0116403 Cuello de ensayo modular para raspador - LATERAL PLUS 10/12
- 2-0116404 Cuello de ensayo modular para raspador - MEDIAL PLUS 10/12
- 2-0116405 Cuello de ensayo modular para raspador - ANTE izquierdo / RETRA derecho 8° 10/12
- 2-0116406 Cuello de ensayo modular para raspador - ANTE derecho / RETRA izquierdo 8° LATERAL 10/12
- 2-0116407 Cuello de ensayo modular para raspador - LATERAL +7 10/12
- 2-0116408 Cuello de ensayo modular para raspador - MEDIAL +7 10/12
- 2-0116409 Cuello de ensayo modular para raspador - LATERAL +10.5 10/12
- 2-0116410 Cuello de ensayo modular para raspador - MEDIAL +10.5 10/12
- 2-0116200 Colocador de cuello modular
- 2-0191800 Colocador de cuello modular 12/14
- 2-0191400 Percutor final de cuello modular 12/14
- 2-0118400 Llave 19
- 2-0115800 Percutor de cabeza y cuello modular 10/12
- 2-0196800 Percutor de cabeza y cuello modular 12/14
- 2-0104328 Extremidad para agarre de cabeza femoral Ø 28
- 2-0191201 Cuello de prueba modular para vástago Lateral / Medial 12/14
- 2-0191202 Cuello de prueba modular para vástago Anterior/ Retraído 8° 12/14
- 2-0191203 Cuello de prueba modular para vástago Lateral plus / Medial plus 12/14
- 2-0191205 Cuello de prueba modular para vástago Lateral / Medial +10.5 12/14
- 2-0191301 Cuello de prueba modular para vástago LATERAL 12/14
- 2-0191302 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL 12/14
- 2-0191303 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL PLUS 12/14
- 2-0191304 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL PLUS 12/14
- 2-0191305 Cuello de prueba modular para raspador ANTE izquierdo / RETRA derecho 8° 12/14

SOCIETE AMRLITUDE, Productos Médicos


 Dra. MONICA L. ROBERTI
 Dirección Técnica
 M.N. 13.305

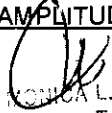

 CAROLINA S. MORETTI
 APODERADA
 OSTEOLIFE S.R.L.


0984



- 2-0191306 Cuello de prueba modular para raspador ANTE derecho / RETRA izquierdo 8° 12/14
 2-0191309 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL 12/14 + 10.5
 2-0191310 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL 12/14 +10.5
 2-0197101 Cuello de prueba modular para vástago Lateral / medial 12/14
 2-0197102 Cuello de prueba modular para vástago Anterior / Retraído 8° 12/14
 2-0197103 Cuello de prueba modular para vástago Lateral plus / Medial plus 12/14
 2-0197104 Cuello de prueba modular para vástago Lateral / Medial +10.5 12/14
 2-0197201 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL 12/14
 2-0197202 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL 12/14
 2-0197203 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL PLUS 12/14
 2-0197204 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL PLUS 12/14
 2-0197205 Cuello de prueba modular para raspador ANTE izquierdo / RETRA derecho 8° 12/14
 2-0197206 Cuello de prueba modular para raspador ANTE derecho / RETRA izquierdo 8° 12/14
 2-0197207 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL +10.5 12/14
 2-0197208 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL +10.5 12/14
 2-0196101 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 28 cuello corto
 2-0196102 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 28 cuello mediano
 2-0196103 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 28 cuello largo
 2-0196104 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 22.2 cuello corto
 2-0196105 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 22.2 cuello mediano
 2-0196106 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 22.2 cuello largo
 2-0196107 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 32 cuello corto
 2-0196108 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 32 cuello mediano
 2-0196109 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 32 cuello largo
 2-0196110 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 36 cuello corto
 2-0196111 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 36 cuello mediano
 2-0196112 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 36 cuello largo
 2-0100201 Raspador femoral de primera intervención Talle 1
 2-0100202 Raspador femoral de primera intervención Talle 2
 2-0100203 Raspador femoral de primera intervención Talle 3
 2-0100204 Raspador femoral de primera intervención Talle 4
 2-0100205 Raspador femoral de primera intervención Talle 5
 2-0100206 Raspador femoral de primera intervención Talle 6
 2-0100207 Raspador femoral de primera intervención Talle 7
 2-0108600 Porta Cotilo corto
 2-0108700 Orientador de porta Cotilo corto
 2-0105122 Extremidad esférica Ø 22.2
 2-0105128 Extremidad esférica Ø 28
 2-0105240 Señuelo cotiloideo Ø 37/40
 2-0105242 Señuelo cotiloideo Ø 38.5/42

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos

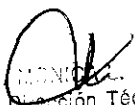

 MÓNICA L. ROBERTS
 Dirección Técnica
 M.N. 13.305

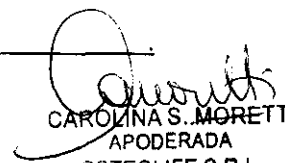

 CAROZINA S. MORETTI
 APODERADA
 OSTEOLIFE S.R.L.



- 2-0105244 Señuelo cotiloideo Ø 40/44
2-0105246 Señuelo cotiloideo Ø 41.5/46
2-0105248 Señuelo cotiloideo Ø 43/48
2-0105250 Señuelo cotiloideo Ø 44.5/50
2-0105252 Señuelo cotiloideo Ø 46/52
2-0105254 Señuelo cotiloideo Ø 47.5/54
2-0105256 Señuelo cotiloideo Ø 49/56
2-0105258 Señuelo cotiloideo Ø 51/58
2-0105260 Señuelo cotiloideo Ø 53/60
2-0105340 Cotilo de ensayo Ø 22.2/37/40
2-0105342 Cotilo de ensayo Ø 22.2/38.5/42
2-0105344 Cotilo de ensayo Ø 22.2/40/44
2-0105346 Cotilo de ensayo Ø 22.2/41.5/46
2-0105348 Cotilo de ensayo Ø 22.2/43/48
2-0105350 Cotilo de ensayo Ø 22.2/44.5/50
2-0105352 Cotilo de ensayo Ø 22.2/46/52
2-0105354 Cotilo de ensayo Ø 22.2/47.5/54
2-0105356 Cotilo de ensayo Ø 22.2/49/56
2-0105358 Cotilo de ensayo Ø 22.2/51/58
2-0105360 Cotilo de ensayo Ø 22.2/53/60
2-0105448 Cotilo de ensayo Ø 28/43/48
2-0105450 Cotilo de ensayo Ø 28/44.5/50
2-0105452 Cotilo de ensayo Ø 28/46/52
2-0105454 Cotilo de ensayo Ø 28/47.5/54
2-0105456 Cotilo de ensayo Ø 28/49/56
2-0105458 Cotilo de ensayo Ø 28/51/58
2-0105460 Cotilo de ensayo Ø 28/53/60
2-0105540 Arandela con uña Ø 37/40
2-0105542 Arandela con uña Ø 38.5/42
2-0105544 Arandela con uña Ø 40/44
2-0105546 Arandela con uña Ø 41.5/46
2-0105548 Arandela con uña Ø 43/48
2-0105550 Arandela con uña Ø 44.5/50
2-0105552 Arandela con uña Ø 46/52
2-0105554 Arandela con uña Ø 47.5/54
2-0105556 Arandela con uña Ø 49/56
2-0105558 Arandela con uña Ø 51/58
2-0105560 Arandela con uña Ø 53/60
2-0104900 Porta Cotilo
2-0105000 Orientador de porta Cotilo
2-0190101 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 101S
2-0190102 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 102S
2-0190201 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 201S
2-0190202 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 202S

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


ROBERTO
Dirección Técnica
M.N. 13.305



CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.

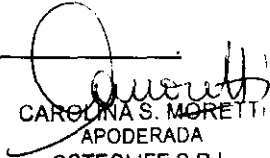
0984



2-0190203 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 203S
2-0190301 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 301S
2-0190302 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 302S
2-0190303 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 303S
2-0190401 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 401S
2-0190402 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 402S
2-0190403 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 403S
2-0190501 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 501S
2-0190502 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 502S
2-0190601 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 601S
2-0190602 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 602S
2-0180101 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 101S
2-0180102 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 102S
2-0180201 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 201S
2-0180202 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 202S
2-0180203 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 203S
2-0180301 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 301S
2-0180302 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 302S
2-0180303 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 303S
2-0180401 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 401S
2-0180402 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 402S
2-0180403 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 403S
2-0180501 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 501S
2-0180502 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 502S
2-0180601 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 601S
2-0180602 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 602S
2-0104700 Árbol de extracción de mana de raspador
2-0170101 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 101S
2-0170102 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 102S
2-0170201 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 201S
2-0170202 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 202S
2-0170203 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 203S
2-0170301 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 301S
2-0170302 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 302S
2-0170303 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 303S
2-0170401 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 401S
2-0170402 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 402S

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos

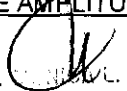

MARIANA L. ROBERTI
Dirección Técnica
M.N. 13.305


CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.



- 2-0170403 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 403S
 2-0170501 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 501S
 2-0170502 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 502S
 2-0170601 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 601S
 2-0170602 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 602S
 2-0104800 Percutor para vástago femoral
 2-0107100 Porta prótesis femoral
 2-0100413 Cabeza de ensayo para vástago Ø 26 cuello mediano
 2-0106800 Cabeza de ensayo femoral INITIALE® 0
 2-0106804 Cabeza de ensayo femoral INITIALE® +4
 2-0106803 Cabeza de ensayo femoral INITIALE® -3
 2-0106700 Extractor de vástago de ensayo
 2-0118306 Llave plana 6 mm (Inox)
 2-0118308 Llave plana 8 mm (Inox)
 2-0104322 Extremidad para agarre de cabeza femoral Ø 22.2
 2-0160121 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 121 D
 2-0160221 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 221 D
 2-0160321 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 321 D
 2-0160421 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 421 D
 2-0160521 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 521 D
 2-0160511 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 511 D
 2-0160531 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 531 D
 2-0150121 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N° 121 D
 2-0150221 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N° 221 D
 2-0150321 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N° 321 D
 2-0150421 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N° 421 D
 2-0150521 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N° 521 D
 2-0140121 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 121 D
 2-0140221 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 221 D
 2-0140321 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 321 D
 2-0140421 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 421 D
 2-0140521 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 521 D
 2-0140511 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 511 D
 2-0140531 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 531 D
 2-0130220 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N° 202 largo 200 mm

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


 ROBERTO
 Dirección Técnica
 T. N. 43.605



 CAROLINA S. MORETTI
 APODERADA
 OSTEOLIFE S.R.L.


0984



2-0130225 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 202 largo 250 mm
2-0130230 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 202 largo 300 mm
2-0130235 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 202 largo 350 mm
2-0130320 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 302 largo 200 mm
2-0130325 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 302 largo 250 mm
2-0130330 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 302 largo 300 mm
2-0130335 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 302 largo 350 mm
2-0130420 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 402 largo 200 mm
2-0130425 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 402 largo 250 mm
2-0130430 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 402 largo 300 mm
2-0130435 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 402 largo 350 mm
2-0130520 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 501 largo 200 mm
2-0130525 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 501 largo 250 mm
2-0130530 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 501 largo 300 mm
2-0120535 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc
N° 501 largo 350 mm
2-0120220 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
202 largo 200 mm
2-0120225 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
202 largo 250 mm
2-0120230 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
202 largo 300 mm
2-0120235 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 350 mm
2-0120320 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 200 mm
2-0120325 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 250 mm
2-0120330 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 300 mm
2-0120335 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 350 mm
2-0120420 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
402 largo 200 mm

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos



Dra. MONICA L. ROBERT
Dirección Técnica
M.N. 13.305



CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.



- 2-0120425 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N° 402 largo 250 mm
2-0120430 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N° 402 largo 300 mm
2-0120435 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N° 402 largo 350 mm
2-0120520 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N° 501 largo 200 mm
2-0120525 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N° 501 largo 250 mm
2-0120530 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N° 501 largo 300 mm
2-0120535 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N° 501 largo 350 mm
2-0192411 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 101S
2-0192412 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 102S
2-0192421 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 201S
2-0192422 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 202S
2-0192423 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 203S
2-0192431 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 301S
2-0192432 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 302S
2-0192433 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 303S
2-0192441 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 401S
2-0192442 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 402S
2-0192443 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 403S
2-0192451 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 501S
2-0192452 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 502S
2-0192461 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 601S
2-0192462 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 602S
2-0117702 Soporte G para navegación Vástago INITIALE® modular decúbitus lateral
2-0117703 Soporte G para navegación Vástago INITIALE® modular decúbitus dorsal

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


Dra. MARIANA L. ROBERTI
Dirección Técnica
M.N. 13.305



CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.

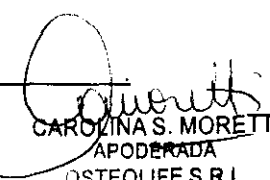
0984



2-0103612 Escariador 12 X 10
 2-0103618 Escariador 18 X 10
 2-0197511 Raspador INITIALE® Talle 101 sin Trocanterómetro
 2-0197512 Raspador INITIALE® Talle 102 sin Trocanterómetro
 2-0197521 Raspador INITIALE® Talle 201 sin Trocanterómetro
 2-0197522 Raspador INITIALE® Talle 202 sin Trocanterómetro
 2-0197523 Raspador INITIALE® Talle 203 sin Trocanterómetro
 2-0197531 Raspador INITIALE® Talle 301 sin Trocanterómetro
 2-0197532 Raspador INITIALE® Talle 302 sin Trocanterómetro
 2-0197533 Raspador INITIALE® Talle 303 sin Trocanterómetro
 2-0197541 Raspador INITIALE® Talle 401 sin Trocanterómetro
 2-0197542 Raspador INITIALE® Talle 402 sin Trocanterómetro
 2-0197543 Raspador INITIALE® Talle 403 sin Trocanterómetro
 2-0197551 Raspador INITIALE® Talle 501 sin Trocanterómetro
 2-0197552 Raspador INITIALE® Talle 502 sin Trocanterómetro
 2-0197561 Raspador INITIALE® Talle 601 sin Trocanterómetro
 2-0197562 Raspador INITIALE® Talle 602 sin Trocanterómetro
 2-0109000 Manga porta fresa cilíndrica
 2-0109110 Fresa cilíndrica Ø 10
 2-0109112 Fresa cilíndrica Ø 12
 2-0109114 Fresa cilíndrica Ø 14
 2-0109116 Fresa cilíndrica Ø 16
 2-0109118 Fresa cilíndrica Ø 16
 2-0200100 Broca intramedular
 2-0100140 Cúpula de ensayo talle 40
 2-0100142 Cúpula de ensayo talle 42
 2-0100144 Cúpula de ensayo talle 44
 2-0100146 Cúpula de ensayo talle 46
 2-0100722 Percutor de núcleo con borde plano Ø22.2
 2-0100728 Percutor de núcleo con borde plano Ø28
 2-0100732 Percutor de núcleo con borde plano Ø32
 2-0101922 Percutor de núcleo con reborde Ø 22.2
 2-0101928 Percutor de núcleo con reborde Ø 28
 2-0101932 Percutor de núcleo con reborde Ø 32
 2-0102000 Orientador de cúpula
 2-0104122 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 22.2
 2-0104128 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 28
 2-0104132 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 32
 2-0107440 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T37/40 D. EXT 44
 2-0107444 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T40/44 D. EXT 48
 2-0107448 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T43/48 D. EXT 52
 2-0107452 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T46/52 D. EXT 56
 2-0107456 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T49/56 D. EXT 60

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos



 Mónica L. BOTELLO
 Dirección Técnica
 M.N. 13.907

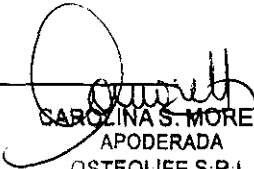

 CAROLINA S. MORETTI
 APODERADA
 OSTEOLIFE S.R.L.



- 2-0107460 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T53/60 D. EXT 64
2-0107540 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T37/40 D. EXT 44
2-0107544 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T40/44 D. EXT 48
2-0107548 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T43/48 D. EXT 52
2-0107552 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T46/52 D. EXT 56
2-0107556 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T49/56 D. EXT 60
2-0107560 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T53/60 D. EXT 64
2-0108800 Herramienta de agarre para fondo de Cotilo
2-0104600 Pinza para tope de retención
2-0101000 Llave de agarre universal
2-0103900 Manga orientadora de núcleo
2-0114400 Percutor para Cotilo para cementar de retención
2-0100301 Raspador femoral de revisión talla 1
2-0100302 Raspador femoral de revisión talla 2
2-0100303 Raspador femoral de revisión talla 3
2-0100304 Raspador femoral de revisión talla 4
2-0100305 Raspador femoral de revisión talla 5
2-0100306 Raspador femoral de revisión talla 6
2-0100307 Raspador femoral de revisión talla 7
2-0100308 Raspador femoral de revisión talla 8
2-0100411 Cabeza de ensayo para vástago Ø 32 cuello extra largo
2-0100601 Cuello de ensayo de revisión Ø 28 cuello corto
2-0100602 Cuello de ensayo de revisión Ø 28 cuello mediano
2-0100603 Cuello de ensayo de revisión Ø 28 cuello largo
2-0100604 Cuello de ensayo de revisión Ø 28 cuello extra largo
2-0100605 Cuello de ensayo de revisión Ø 22.2 cuello corto
2-0100606 Cuello de ensayo de revisión Ø 22.2 cuello mediano
2-0100607 Cuello de ensayo de revisión Ø 22.2 cuello largo
2-0100608 Cuello de ensayo de revisión Ø 32 cuello corto
2-0100609 Cuello de ensayo de revisión Ø 32 cuello mediano
2-0100610 Cuello de ensayo de revisión Ø 32 cuello largo
2-0100611 Cuello de ensayo de revisión Ø 32 cuello extra largo
2-0100900 Percutor de vástago
2-0103700 Trocanterómetro
2-0104200 Empuñadura de sostén
2-0104332 Extremidad para agarre de cabeza femoral Ø32
2-0112200 Galga de calibración intramedular
2-0111000 Regla milimétrica de 300 mm
2-0112300 Calibrador de escariador
2-0110800 Herramienta de ranurado guía de fresa para trocánter
2-0111900 Fresa para clavo diafisario Ø 10 y Ø 12

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


DIRECCIÓN TÉCNICA
CALLE 13 000



CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.




0984

- 2-0110400 Tuerca de bloqueo para dispositivo de ensayo
 2-0111101 Clavo diafisario de ensayo Ø 10 largo 250 mm
 2-0111102 Clavo diafisario de ensayo Ø 10 largo 300 mm
 2-0111103 Clavo diafisario de ensayo Ø 10 largo 350 mm
 2-0111111 Clavo diafisario de ensayo Ø 12 largo 250 mm
 2-0111112 Clavo diafisario de ensayo Ø 12 largo 300 mm
 2-0111113 Clavo diafisario de ensayo Ø 12 largo 350 mm
 2-0111114 Clavo diafisario de ensayo Ø 12 largo 400 mm
 2-0111121 Clavo diafisario de ensayo Ø 14 largo 250 mm
 2-0111122 Clavo diafisario de ensayo Ø 14 largo 300 mm
 2-0111123 Clavo diafisario de ensayo Ø 14 largo 350 mm
 2-0111124 Clavo diafisario de ensayo Ø 14 largo 400 mm
 2-0111131 Clavo diafisario de ensayo Ø 16 largo 250 mm
 2-0111132 Clavo diafisario de ensayo Ø 16 largo 300 mm
 2-0111133 Clavo diafisario de ensayo Ø 16 largo 350 mm
 2-0111134 Clavo diafisario de ensayo Ø 16 largo 400 mm
 2-0111141 Clavo diafisario de ensayo Ø 18 largo 250 mm
 2-0111142 Clavo diafisario de ensayo Ø 18 largo 300 mm
 2-0111143 Clavo diafisario de ensayo Ø 18 largo 350 mm
 2-0111144 Clavo diafisario de ensayo Ø 18 largo 400 mm
 2-0111151 Clavo diafisario de ensayo Ø 20 largo 250 mm
 2-0111152 Clavo diafisario de ensayo Ø 20 largo 300 mm
 2-0111153 Clavo diafisario de ensayo Ø 20 largo 350 mm
 2-0111154 Clavo diafisario de ensayo Ø 20 largo 400 mm
 2-0111701 Metáfisis estándar de ensayo talla 1
 2-0111702 Metáfisis estándar de ensayo talla 2
 2-0111703 Metáfisis estándar de ensayo talla 3
 2-0111704 Metáfisis estándar de ensayo talla 4
 2-0111711 Metáfisis de ensayo desfasado talla 1 DP/GA
 2-0111712 Metáfisis de ensayo desfasado talla 2 DP/GA
 2-0111713 Metáfisis de ensayo desfasado talla 3 DP/GA
 2-0111714 Metáfisis de ensayo desfasado talla 4 DP/GA
 2-0111721 Metáfisis de ensayo desfasado talla 1 DA/GP
 2-0111722 Metáfisis de ensayo desfasado talla 2 DA/GP
 2-0111723 Metáfisis de ensayo desfasado talla 3 DA/GP
 2-0111724 Metáfisis de ensayo desfasado talla 4 DA/GP
 2-0111801 Epífisis de ensayo talla 1
 2-0111802 Epífisis de ensayo talla 2
 2-0111803 Epífisis de ensayo talla 3
 2-0111804 Epífisis de ensayo talla 4
 2-0111811 Epífisis de ensayo talla 1 con collarete
 2-0111812 Epífisis de ensayo talla 2 con collarete
 2-0111813 Epífisis de ensayo talla 3 con collarete
 2-0111814 Epífisis de ensayo talla 4 con collarete
 2-0110700 Alargador para clavo diafisario
 2-0110100 Destornillador derecho H5
 2-0109401 Manga de raspador metafisario monobloc talla 1
 2-0109402 Manga de raspador metafisario monobloc talla 2

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


 CAROLINA L. ROBERTI
 Dirección Técnica
 M. N. 10.205

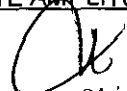

 CAROLINA S. MORETTI
 APODERADA
 OSTEOLIFE S.R.L.




984

- 2-0109403 Manga de raspador metafisario monobloc talla 3
- 2-0109404 Manga de raspador metafisario monobloc talla 4
- 2-0103000 Perno suave Ø 2
- 2-0109900 Agarre de pieza de ensayo
- 2-0109200 Alargador para clavo diafisario implantable
- 2-0109800 Brazo de manipulación
- 2-0109500 Guía de cierre
- 2-0109700 Tornillo de mantenimiento para brazo de manipulación
- 2-0109600 Placa guía de perforación
- 2-0111500 Tope de bloqueo para broca
- 2-0111200 Medidor de tornillo
- 2-0111300 Tornillo de bloqueo para pieza de ensayo
- 2-0112000 Percutor de metáfisis EXTREME
- 2-0112100 Percutor de epífisis EXTREME
- 2-0191600 Percutor de epífisis EXTREME y metáfisis monobloc
- 2-0110200 Extractor de epífisis
- 2-0110300 Extracto de metáfisis
- 2-0118700 Extractor de metáfisis antes del 2000
- 2-0111920 Vástago extractor de epífisis metáfisis monobloc
- 2-0110500 Eje de mantenimiento
- 2-0113400 Galga de impacción metafisaria
- 2-0191500 Medidor de impacción epífisis metáfisis monobloc
- 2-0113700 Extremidad extractor de pieza de ensayo
- 2-0114100 Porta prótesis EXTREME
- 2-0119900 Porta prótesis EXTREME monobloc
- 2-0191900 Empuñadura fija largo 150
- 2-0118200 Placa de impacción para vástago femoral de reconstrucción
- 2-0191700 Llave de mantenimiento epífisis EXTREME®
- 2-0119103 Vástago para llave dinamométrica H5
- 2-0111600 Broca para tornillo de cierre
- 2-0197300 Guía de ranurado para escariador flexible Ø 3 largo 500 mm
- 2-0195701 Raspador talla 1 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195702 Raspador talla 2 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195703 Raspador talla 3 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195713 Raspador talla 3 Ø 14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195704 Raspador talla 4 Ø 14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195715 Raspador talla 5 Ø 14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195705 Raspador talla 5 Ø 16 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195801 Raspador talla 1 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195802 Raspador talla 2 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195803 Raspador talla 3 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195813 Raspador talla 3 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195804 Raspador talla 4 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195815 Raspador talla 5 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195805 Raspador talla 5 Ø 16 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195901 Vástago de ensayo talla 1 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195902 Vástago de ensayo talla 2 Ø12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195903 Vástago de ensayo talla 3 Ø12 derecho para vástago OPTIMAL

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


Dra. MONICA L. ROBERTO
Dirección Técnica
M.N. 13.305


CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.

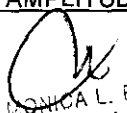


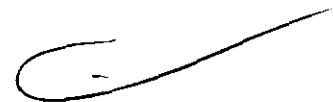
- 2-0195913 Vástago de ensayo talle 3 Ø14 derecho para vástago OPTIMAL
2-0195904 Vástago de ensayo talle 4 Ø14 derecho para vástago OPTIMAL
2-0195915 Vástago de ensayo talle 5 Ø14 derecho para vástago OPTIMAL
2-0195905 Vástago de ensayo talle 5 Ø16 derecho para vástago OPTIMAL
2-0196001 Vástago de prueba talle 1 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
2-0196002 Vástago de prueba talle 2 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
2-0196003 Vástago de prueba talle 3 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
2-0196013 Vástago de prueba talle 3 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
2-0196004 Vástago de prueba talle 4 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
2-0196015 Vástago de prueba talle 5 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
2-0196005 Vástago de prueba talle 5 Ø 16 izquierdo para vástago OPTIMAL
2-0196900 Extractor de vástago femoral modular
2-0116300 Tijeras sacabocado
2-0116102 Cuello de ensayo modular para vástago Anterior / retraído 8 °10/12
2-0116105 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral / Medial +10.5 10/12
2-0116401 Cuello de ensayo modular para vástago LATERAL 10/12
2-0116402 Cuello de ensayo modular para vástago MEDIAL 10/12
2-0116403 Cuello de ensayo modular para vástago LATERAL PLUS 10/12
2-0116404 Cuello de ensayo modular para vástago MEDIAL PLUS 10/12
2-0116405 Cuello de ensayo modular para vástago ANTE izquierdo/ RETRA derecho 8° 10/12
2-0116406 Cuello de ensayo modular para vástago ANTE derecho / RETRA izquierdo 8° 10/12
2-0116407 Cuello de ensayo modular para vástago LATERAL +7l 10/12
2-0116408 Cuello de ensayo modular para vástago MEDAL +7 10/12
2-0116409 Cuello de ensayo modular para vástago - LATERAL +10.5 10/12
2-0116410 Cuello de ensayo modular para vástago - MEDIAL +10.5 10/12
2-0100401 Cabeza de ensayo para vástago Ø cuello corto
2-0100402 Cabeza de ensayo para vástago Ø cuello mediano
2-0100403 Cabeza de ensayo para vástago Ø cuello largo
2-0100404 Cabeza de ensayo para vástago Ø cuello extra largo
2-0100405 Cabeza de ensayo para vástago Ø 22.2 cuello corto
2-0100406 Cabeza de ensayo para vástago Ø 22.2 cuello mediano
2-0100407 Cabeza de ensayo para vástago Ø 22.2 cuello largo
2-0100408 Cabeza de ensayo para vástago Ø 32 cuello corto
2-0100409 Cabeza de ensayo para vástago Ø 32 cuello mediano
2-0100410 Cabeza de ensayo para vástago Ø 32 cuello largo
2-0115800 Percutor de cabeza y cuello modular



- 2-0109300 Empuñadura fija
- 2-0110600 Clavo pulido
- 2-0111500 Tope fijo para broca
- 2-0197700 Medidor de chaveta optimal
- 2-0197800 Destornillador H5 corto para cierre optimal
- 2-0197900 Destornillador H5 largo para cierre optimal
- 2-0110000 Destornillador H5 de cierre
- 2-0196200 Percutor orientador de vástago optimal
- 2-0196300 Porta prótesis de vástago optimal
- 2-0196400 Brazo de manipulación de vástago optimal
- 2-0196500 Tornillo de apriete del marco de atornillamiento para vástago optimal
- 2-0196700 Marco de atornillamiento para vástago optimal
- 2-0197012 Escariador guía de fresa para trocánter 12X10
- 2-0197018 Escariador guía de fresa para trocánter 18X10
- 2-0110900 Fresa para trocánter
- 2-0196600 Broca para chaveta de vástago optimal N° 1
- 2-0198000 Broca para chaveta de vástago optimal N° 2
- 2-0118800 Cuerpo percutor de cúpula THA.HY.TI.BJR
- 2-0118000 Porta fresa derecho navegación
- 2-0116800 Palpador navegación cadera
- 2-0119000 Soporte G para navegación vástago décubitus lateral THA.HY.TI BJR
- 2-0118900 Soporte G para navegación vástago décubitus dorsal THA.HY.TI BJR
- 2-0116600 Soporte CR adquisición eje de escariador
- 2-0117100 Sistema de fijación derecho de geometría de navegación
- 2-0117200 Sistema de fijación inclinad de geometría de navegación
- 2-0200800 Destornillador H5
- 2-0117300 Cuerpo rígido I cresta ilíaca de navegación
- 2-0117400 Cuerpo rígido F fémur de navegación
- 2-0117600 Llave de agarre universal
- 2-0208700 Seguro para fijación Ø 4 largo 150 mm
- 2-0208702 Seguro para fijación Ø 4 largo 100 mm
- 2-0201100 Bloqueo universal para broca auto perforante
- 2-0201200 Bloqueo universal AO para broca auto perforante
- 3-0400-901 MARCADORES AMPLIVISION estériles (acondicionados en grupos de 7)
- 3-0400-902 MARCADORES AMPLIVISION estériles (acondicionados en grupos de 14)
- 0-0223700 Brocas AMPLIVISION Ø 4 Lg 150 mm estériles (acondicionados en grupos de 4)
- 3-0401001 Estación AMPLIVISION
- 3-0402001 Opción "soporte móvil"
- 3-0401401 Software PTH
- 3-0401402 Software PTH (opción BJR)
- 3-0401403 Software PTH INITIALE

SOCIETE AMPLITUDE, Productos Médicos


M. MONICA L. ROBERTI
Dirección Técnica
M.N. 13.305


CAROLINA S. MORETTI
APODERADA
OSTEOLIFE S.R.L.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

ANEXO III
CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-19705-11-1

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **0.9.8.4.**, y de acuerdo a lo solicitado por OSTEOLIFE S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE PRÓTESIS TOTAL DE CADERA E INSTRUMENTAL.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-150 - PRÓTESIS DE ARTICULACIÓN PARA CADERA, TOTALES.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): INTEGRALE®, LOGIC®, GENERIC®, NATURE®, EQUATEUR®, HORIZON®, DELTA®, SATURNE®, ACOR®, INITIALE®, LUNA®, EXTREME®, OPTIMAL®, AMPLIVISION®.

Clase de Riesgo: Clase III.

Indicación/es autorizada/s: Afecções de la articulación de la cadera debidas a una enfermedad degenerativa o congénita, inflamatoria o postraumática. Secuelas de intervenciones anteriores, Prótesis total de Cadera, Osteotomía.

Modelo/s: 1-0100101 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 1

1-0100102 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 2

1-0100103 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 3

1-0100104 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 4

1-0100105 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 5

1-0100106 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 6

1-0100107 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 7

1-0100108 Vástago femoral INTEGRALE® - sin cemento Talle 8

1-0101701 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial - sin cemento Talle 1

1-0101702 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial - sin cemento Talle 2

1-0101703 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial - sin cemento Talle 3

1-0101704 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial - sin cemento Talle 4

..//

- 1-0101705 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial – sin cemento Talle 5
- 1-0101706 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial – sin cemento Talle 6
- 1-0101707 Vástago femoral LOGIC® HAP parcial – sin cemento Talle 7
- 1-0100201 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 1
- 1-0100202 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 2
- 1-0100203 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 3
- 1-0100204 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 4
- 1-0100205 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 5
- 1-0100206 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 6
- 1-0100207 Vástago femoral GENERIC® – para cementar Talle 7
- 1-0101301 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 1
- 1-0101302 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 2
- 1-0101303 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 3
- 1-0101304 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 4
- 1-0101305 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 5
- 1-0101306 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 6
- 1-0101307 Vástago femoral NATURE® – sin cemento, recubrimiento grano fino Talle 7
- 1-0100540 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talla 40mm
- 1-0100542 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 42mm
- 1-0100544 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 44mm
- 1-0100546 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 46mm
- 1-0100548 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 48mm
- 1-0100550 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 50mm
- 1-0100552 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 52mm






Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0100554 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 54mm
- 1-0100556 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 56mm
- 1-0100558 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 58mm
- 1-0100560 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 60mm
- 1-0100562 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 62mm
- 1-0100564 Cúpula EQUATEUR® con agujeros con HAP Talle 64mm
- 1-0100640 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talle 40mm
- 1-0100642 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 42mm
- 1-0100644 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 44mm
- 1-0100646 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 46mm
- 1-0100648 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 48mm
- 1-0100650 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 50mm
- 1-0100652 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 52mm
- 1-0100654 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 54mm
- 1-0100656 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 56mm
- 1-0100658 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 58mm
- 1-0100660 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 60mm
- 1-0100662 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 62mm
- 1-0100664 Cúpula EQUATEUR® sin agujeros con HAP Talla 64mm
- 5-0100200 Tornillo obturador de fondo de cúpula
- 1-0100740 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 40/22
- 1-0100742 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 42/22
- 1-0100744 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 44/22
- 1-0100746 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 46/22
- 1-0100748 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 48/22
- 1-0100750 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 50/22
- 1-0100752 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 52/22
- 1-0100754 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 54/22
- 1-0100756 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 56/22
- 1-0100758 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 58/22
- 1-0100760 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 60/22

..//

1-0100762 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 62/22
1-0100764 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 64/22
1-0100848 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 48/28
1-0100850 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 50/28
1-0100852 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 52/28
1-0100854 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 54/28
1-0100856 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 56/28
1-0100858 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 58/28
1-0100860 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 60/28
1-0100862 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 62/28
1-0100864 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 64/28
1-0100952 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 52/32
1-0100954 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 54/32
1-0100956 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 56/32
1-0100958 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 58/32
1-0100960 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 60/32
1-0100962 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 62/32
1-0100964 Inserto con borde plano para Cotilo Talle 64/32
1-0101040 Inserto con reborde para Cotilo Talle 40/22
1-0101042 Inserto con reborde para Cotilo Talle 42/22
1-0101044 Inserto con reborde para Cotilo Talle 44/22
1-0101046 Inserto con reborde para Cotilo Talle 46/22
1-0101048 Inserto con reborde para Cotilo Talle 48/22
1-0101050 Inserto con reborde para Cotilo Talle 50/22
1-0101052 Inserto con reborde para Cotilo Talle 52/22
1-0101054 Inserto con reborde para Cotilo Talle 54/22
1-0101056 Inserto con reborde para Cotilo Talle 56/22
1-0101058 Inserto con reborde para Cotilo Talle 58/22
1-0101060 Inserto con reborde para Cotilo Talle 60/22
1-0101062 Inserto con reborde para Cotilo Talle 62/22
1-0101064 Inserto con reborde para Cotilo Talle 64/22





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0101548 Inserto con reborde para Cotilo Talle 48/28
- 1-0101550 Inserto con reborde para Cotilo Talle 50/28
- 1-0101552 Inserto con reborde para Cotilo Talle 52/28
- 1-0101554 Inserto con reborde para Cotilo Talle 54/28
- 1-0101556 Inserto con reborde para Cotilo Talle 56/28
- 1-0101558 Inserto con reborde para Cotilo Talle 58/28
- 1-0101560 Inserto con reborde para Cotilo Talle 60/28
- 1-0101562 Inserto con reborde para Cotilo Talle 62/28
- 1-0101564 Inserto con reborde para Cotilo Talle 64/28
- 1-0101252 Inserto con reborde para Cotilo Talle 52/32
- 1-0101254 Inserto con reborde para Cotilo Talle 54/32
- 1-0101256 Inserto con reborde para Cotilo Talle 56/32
- 1-0101258 Inserto con reborde para Cotilo Talle 58/32
- 1-0101260 Inserto con reborde para Cotilo Talle 60/32
- 1-0101262 Inserto con reborde para Cotilo Talle 62/32
- 1-0101264 Inserto con reborde para Cotilo Talle 64/32
- 1-0101616 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 16 mm
- 1-0101620 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 20 mm
- 1-0101625 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 25 mm
- 1-0101630 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 30 mm
- 1-0101635 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 35 mm
- 1-0101640 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 40 mm
- 1-0101645 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 45 mm
- 1-0101650 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 50 mm
- 1-0101655 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 55 mm
- 1-0101660 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 60 mm
- 1-0101665 Tornillo para hueso esponjoso Ø 6.5 de largo 65 mm
- 1-0101838 Obturador diafisario
- 1-0101101 Cabeza femoral M30NW Ø 22.2 Cuello corto
- 1-0101102 Cabeza femoral M30NW Ø 22.2 Cuello mediano
- 1-0101103 Cabeza femoral M30NW Ø 22.2 Cuello largo

S

..//

- 1-0101111 Cabeza femoral M30NW Ø 28 Cuello corto
- 1-0101112 Cabeza femoral M30NW Ø 28 Cuello mediano
- 1-0101113 Cabeza femoral M30NW Ø 28 Cuello largo
- 1-0101114 Cabeza femoral M30NW Ø 28 Cuello extra largo
- 1-0101121 Cabeza femoral M30NW Ø 32 Cuello corto
- 1-0101122 Cabeza femoral M30NW Ø 32 Cuello mediano
- 1-0101123 Cabeza femoral M30NW Ø 32 Cuello largo
- 1-0101124 Cabeza femoral M30NW Ø 32 Cuello extra largo
- 1-0101131 Cabeza femoral M30NW Ø 26 Cuello corto
- 1-0101132 Cabeza femoral M30NW Ø 26 Cuello mediano
- 1-0101133 Cabeza femoral M30NW Ø 26 Cuello largo
- 1-0190701 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 22.2 Cuello corto
- 1-0190702 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 22.2 Cuello mediano
- 1-0190703 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 22.2 Cuello largo
- 1-0190711 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 28 Cuello corto
- 1-0190712 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 28 Cuello mediano
- 1-0190713 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 28 Cuello largo
- 1-0190714 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 28 Cuello extra largo
- 1-0190721 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 32 Cuello corto
- 1-0190722 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 32 Cuello mediano
- 1-0190723 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 32 Cuello largo
- 1-0190724 Cabeza femoral metálica M30NW 12/14 Ø 32 Cuello extra largo
- 1-0102248 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 48 para inserto cerámico
- 1-0102250 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 50 para inserto cerámico
- 1-0102252 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 52 para inserto cerámico
- 1-0102254 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 54 para inserto cerámico





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0102256 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 56 para inserto cerámico
- 1-0102258 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 58 para inserto cerámico
- 1-0102260 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 60 para inserto cerámico
- 1-0102262 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 62 para inserto cerámico
- 1-0102264 Cúpula HORIZON® con agujeros HAP Talle 64 para inserto cerámico
- 1-0102301 Inserto cerámico 36/28 para Cotilo Talle 48/28
- 1-0102302 Inserto cerámico 39/28 para Cotilo Talle 50/28 y 52/28
- 1-0102303 Inserto cerámico 41/28 para Cotilo Talle 54/28
- 1-0102304 Inserto cerámico 44/28 para Cotilo Talle 56 y 58/28
- 1-0102305 Inserto cerámico 48/28 para Cotilo Talle 60/28 y 62/28
- 1-0102306 Inserto cerámico 52/28 para Cotilo Talle 64/28
- 1-0102400 Inserto cerámico 39/32 para Cotilo Talle 50/32 y 52/32
- 1-0102401 Inserto cerámico 41/32 para Cotilo Talle 54/32
- 1-0102402 Inserto cerámico 44/32 para Cotilo Talle 56/32 y 58/32
- 1-0102403 Inserto cerámico 48/32 para Cotilo Talle 60/32 y 62/32
- 1-0102404 Inserto cerámico 52/32 para Cotilo Talle 64/32
- 1-0106900 Inserto cerámico 44/36 para Cotilo Talle 56/36 y 58/36
- 1-0106901 Inserto cerámico 48/36 para Cotilo Talle 60/36 y 62/36
- 1-0106902 Inserto cerámico 52/36 para Cotilo Talle 64/36
- 1-0102711 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 28 mm Cuello corto
- 1-0102712 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 28 mm Cuello mediano
- 1-0102713 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 28 mm Cuello largo

S,

..//

1-0102721 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 32 mm Cuello corto

1-0102722 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 32 mm Cuello mediano

1-0102723 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 32 mm Cuello largo

1-0102731 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 36 mm Cuello corto

1-0102732 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 36 mm Cuello mediano

1-0102733 Cabeza femoral de cerámica de alúmina diámetro 36 mm Cuello largo

1-0190811 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 28 mm Cuello corto

1-0190812 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 28 mm Cuello mediano

1-0190813 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 28 mm Cuello largo

1-0190821 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 32 mm Cuello corto

1-0190822 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 32 mm Cuello mediano

1-0190823 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 32 mm Cuello largo

1-0190831 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 36 mm Cuello corto

1-0190832 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 36 mm Cuello mediano

1-0190833 Cabeza de cerámica de alúmina 12/14 Ø 36 mm Cuello largo

1-0190911 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 28 mm Cuello corto

1-0190912 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 28 mm Cuello mediano

1-0190913 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 28 mm Cuello largo

1-0190921 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 32 mm Cuello corto

1-0190922 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 32 mm Cuello mediano

1-0190923 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 32 mm Cuello largo

1-0190924 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 32 mm Cuello extra largo

1-0190931 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 36 mm Cuello corto

1-0190932 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 36 mm Cuello mediano

1-0190933 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 36 mm Cuello largo



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. P.

..//

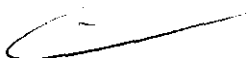
- 1-0190934 Cabeza de cerámica DELTA 12/14 Ø 36 mm Cuello extra largo
- 1-0103444 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 44
- 1-0103446 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 46
- 1-0103448 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 48
- 1-0103450 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 50
- 1-0103452 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 52
- 1-0103454 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 54
- 1-0103456 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 56
- 1-0103458 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 58
- 1-0103460 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 60
- 1-0103462 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 62
- 1-0103464 Cotilo doble movilidad Saturne® Press-Fit Hap Talle 64
- 1-0103350 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 50
- 1-0103352 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 52
- 1-0103354 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 54
- 1-0103356 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 56
- 1-0103358 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 58
- 1-0103360 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 60
- 1-0103362 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 62
- 1-0103364 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 64
- 1-0103366 Cotilo doble movilidad SATURNE® de reconstrucción HAP Talle 66
- 1-0106244 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 44
- 1-0106246 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 46
- 1-0106248 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 48
- 1-0106250 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 50
- 1-0106252 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 52
- 1-0106254 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 54
- 1-0106256 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 56
- 1-0106258 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 58
- 1-0106260 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 60
- 1-0106262 Cotilo doble movilidad SATURNE® para cementar Talle 62

5,

..//

1-0103644 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 44/22
1-0103646 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 46/22
1-0103648 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 48/22
1-0103650 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 50/22
1-0103652 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 52/22
1-0103654 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 54/22
1-0103656 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 56/22
1-0103658 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 58/22
1-0103660 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 60/22
1-0103662 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 62/22
1-0103664 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 64/22
1-0103666 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 66/22
0-0103748 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 48/2/
0-0103750 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 50/28
0-0103752 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 52/28
0-0103754 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 54/28
0-0103756 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 56/28
0-0103758 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 58/28
0-0103760 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 60/28
0-0103762 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 62/28
0-0103764 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 64/28
0-0103766 Inserto para Cotilo doble movilidad SATURNE® Talle 66/28
1-01066D1 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 1 derecho
1-01066D2 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 2 derecho
1-01066D3 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 3 derecho
1-01066D4 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 4 derecho

..//





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.N.M.S.T.

1-01066D5 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 5 derecho

1-01066D6 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 6 derecho

1-01066D7 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 7 derecho

1-01066G1 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 1 izquierdo

1-01066G2 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 2 izquierdo

1-01066G3 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 3 izquierdo

1-01066G4 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 4 izquierdo

1-01066G5 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 5 izquierdo

1-01066G6 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 6 izquierdo

1-01066G7 Vástago femoral anatómico ACOR® modular sin cemento HAP
Talle 7 izquierdo

5- 0-01070D1 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle
1 derecho

0-01070D2 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle
2 derecho

0-01070D3 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle
3 derecho

0-01070D4 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle
4 derecho

0-01070D5 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle
5 derecho

0-01070D6 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle
6 derecho

..//

0-01070D7 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle 7 derecho

0-01070G1 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle 1 izquierdo

0-01070G2 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle 2 izquierdo

0-01070G3 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle 3 izquierdo

0-01070G4 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle 4 izquierdo

0-01070G5 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle 5 izquierdo

0-01070G6 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle 6 izquierdo

0-01070G7 Vástago femoral anatómico ACOR® modular para cementar Talle 7 izquierdo

1-0106701 Cuello modular Lateral / Medial 10/12

1-0106702 Cuello modular Anterior / Retraído 8° 10/12

1-0106703 Cuello modular Lateral plus / Medial plus 10/12

1-0106704 Cuello modular Lateral / Medial 10/12 + 10.5

1-0106705 Cuello modular Lateral / Medial 10/12 + 7

1-0107101 Cuello modular Lateral / Medial 12/14

1-0107102 Cuello modular Lateral plus / Medial plus 12/14

1-0107103 Cuello modular Anterior / Retraído 8° 12/14

1-0107104 Cuello modular Lateral / Medial 12/14 + 10.5

1-0191001 Cuello modular Lateral / Medial 12/14

1-0191002 Cuello modular Lateral plus / Medial plus 12/14

1-0191003 Cuello modular Anterior / Retraído 8° 12/14

1-0191004 Cuello modular Lateral / Medial 12/14 + 10.5

1-0106502 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle 2

1-0106503 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle 3



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0106504 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle 4
- 1-0106505 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle 5
- 1-0106506 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle 6
- 1-0106507 Vástago femoral INTEGRALE® modular sin cemento HAP Talle 7
- 1-0190101 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 101S
- 1-0190102 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 102S
- 1-0190201 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 201S
- 1-0190202 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 202S
- 1-0190203 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 203S
- 1-0190301 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 301S
- 1-0190302 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 302S
- 1-0190303 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 303S
- 1-0190401 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 401S
- 1-0190402 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 402S
- 1-0190403 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 403S
- 1-0190501 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 501S
- 1-0190502 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 502S
- 1-0190601 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 601S
- 1-0190602 Prótesis femoral INITIALE® Monoblock 22.2 N° 602S
- 1-0180102 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 101S
- 1-0180102 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 102S
- 1-0180201 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 201S
- 1-0180202 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 202S
- 1-0180203 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 203S
- 1-0180301 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 301S
- 1-0180302 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 302S
- 1-0180303 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 303S
- 1-0180401 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 401S
- 1-0180402 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 402S
- 1-0180403 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 403S
- 1-0180501 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 501S

..//

- 1-0180502 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 502S
- 1-0180601 Prótesis femoral INITIALE® modular N° 601S
- 1-0180602 Prótesis femoral INITIALE® N° 602S
- 1-0104800 Cabeza Femoral INITIALE® -3
- 1-0104801 Cabeza Femoral INITIALE® 0
- 1-0104802 Cabeza Femoral INITIALE® +4
- 1-0150121 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 121 D
- 1-0150221 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 221 D
- 1-0150321 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 321 D
- 1-0150421 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 421 D
- 1-0150521 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 521 D
- 1-0150511 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 511 D
- 1-0150531 Prótesis femoral displásica INITIALE® monobloc N° 531 D
- 1-0140121 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 121 D
- 1-0140221 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 221 D
- 1-0140321 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 321 D
- 1-0140421 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 421 D
- 1-0140521 Prótesis femoral displásica INITIALE® modular N° 521 D
- 1-0170220 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 202 Ig. 200 mm
- 1-0170225 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 202 Ig. 250 mm
- 1-0170230 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 202 Ig. 300 mm
- 1-0170235 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 202 Ig. 350 mm
- 1-0170320 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 302 Ig. 200 mm
- 1-0170325 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 302 Ig. 250 mm





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0170330 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 302 Ig. 300 mm

1-0170335 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 302 Ig. 350 mm

1-0170420 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 402 Ig. 200 mm

1-0170425 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 402 Ig. 250 mm

1-0170430 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 402 Ig. 300 mm

1-0170435 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 402 Ig. 350 mm

1-0170520 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 501 Ig. 200 mm

1-0170525 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 501 Ig. 250 mm

1-0170530 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 501 Ig. 300 mm

1-0170535 Prótesis femoral de revisión INITIALE® monobloc N° 501 Ig. 350 mm

5 1-0160220 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 202 Ig. 200 mm

1-0160225 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 202 Ig. 250 mm

1-0160230 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 202 Ig. 300 mm

1-0160235 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 202 Ig. 350 mm

1-0160320 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 302 Ig. 200 mm

..//

1-0160325 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 302 Ig. 250 mm

1-0160330 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 302 Ig. 300 mm

1-0160335 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 302 Ig. 350 mm

1-0160420 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 402 Ig. 200 mm

1-0160425 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 402 Ig. 250 mm

1-0160430 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 402 Ig. 300 mm

1-0160435 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 402 Ig. 350 mm

1-0160520 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 501 Ig. 200 mm

1-0160525 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 501 Ig. 250 mm

1-0160530 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 501 Ig. 300 mm

1-0160535 Prótesis femoral de revisión INITIALE® modular N° 501 Ig. 350 mm

1-0105440 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/37/40

1-0105442 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/38.5/42

1-0105444 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/40/44

1-0105446 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/41.5/46

1-0105448 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/43/48

1-0105450 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/44.5/50

1-0105452 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/46/52

1-0105454 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/47.5/54

1-0105456 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/49/56





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0105458 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2/51/58
- 1-0105460 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 22.2 /53/60
- 1-0104748 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/43/48
- 1-0104750 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/44.5/50
- 1-0104752 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/46/52
- 1-0104754 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/47.5/54
- 1-0104756 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/49/56
- 1-0104758 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/51/58
- 1-0104760 Cotilo de polietileno INITIALE® Ø 28/53/60
- 1-0101940 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 40/22
- 1-0101942 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 42/22
- 1-0101944 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 44/22
- 1-0101946 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 46/22
- 1-0101948 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 48/22
- 1-0101950 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 50/22
- 1-0101952 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 52/22
- 1-0101954 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 54/22
- 1-0101956 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 56/22
- 1-0101958 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 58/22
- 1-0101960 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 60/22

5,

..//

1-0101962 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 62/22

1-0101964 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 64/22

1-0102044 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 44/28

1-0102046 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 46/28

1-0102048 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 48/28

1-0102050 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 50/28

1-0102052 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 52/28

1-0102054 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 54/28

1-0102056 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 56/28

5 1-0102058 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 58/28


1-0102060 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 60/28

1-0102062 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 62/28

1-0102064 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 64/28

1-0102148 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 48/32

1-0102150 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 50/32





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

1-0102152 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 52/32

1-0102154 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 54/32

1-0102156 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 56/32

1-0102158 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 58/32

1-0102160 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 60/32

1-0102162 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 62/32

1-0102164 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con borde plano Talle 64/32

1-0102840 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 40/22

1-0102842 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 42/22

1-0102844 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 44/22

1-0102846 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 46/22

1-0102848 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 48/22

1-0102850 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 50/22

1-0102852 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 52/22

1-0102854 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 54/22

..//

1-0102856 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 56/22

1-0102858 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 58/22

1-0102860 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 60/22

1-0102862 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 62/22

1-0102864 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 64/22

1-0102944 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 44/28

1-0102946 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 46/28

1-0102948 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 48/28

1-0102950 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 50/28

01 1-0102952 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 52/28

1-0102954 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 54/28

1-0102956 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 56/28

1-0102958 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 58/28

1-0102960 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 60/28

1-0102962 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 62/28





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.I.

..//

1-0102964 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 64/28

1-0103048 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 48/32

1-0103050 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 50/32

1-0103052 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 52/32

1-0103054 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 54/32

1-0103056 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 56/32

1-0103058 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 58/32

1-0103060 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 60/32

1-0103062 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 62/32

1-0103064 Cotilo de polietileno LUNA® para cementar con reborde Talle 64/32

0-0103140 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 37/40 D. EXT 44

0-0103144 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 40/44 D. EXT 48

0-0103148 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 43/48 D. EXT 52

0-0103152 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 46/52 D. EXT 56

0-0103156 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 49/56 D. EXT 60

0-0103160 Fondo de Cotilo derecho para Cotilo Talle 53/60 D. EXT 64

0-0103240 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 37/40 D. EXT 44

0-0103244 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 40/44 D. EXT 48

0-0103248 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 43/48 D. EXT 52

0-0103252 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 46/52 D. EXT 56

0-0103256 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 49/56 D. EXT 60

5

..//

- 0-0103260 Fondo de Cotilo izquierdo para Cotilo Talle 53/60 D. EXT 64
- 0-0105001 Gancho para trocánter derecho largo 90 mm
- 0-0105002 Gancho para trocánter derecho largo 100 mm
- 0-0105101 Gancho para trocánter izquierdo largo 90 mm
- 0-0105102 Gancho para trocánter izquierdo largo 100 mm
- 1-0105201 Placa trocantérica largo 70 mm
- 1-0105202 Placa trocantérica largo 85 mm
- 1-0105203 Placa trocantérica largo 100 mm
- 1-0105301 Placa trocantérica con patas laterales largo 70 mm
- 1-0105302 Placa trocantérica con patas laterales largo 85 mm
- 1-0105303 Placa trocantérica con patas laterales largo 100 mm
- 1-0105512 Hilo de cerclaje 12/10 largo 550 mm (acondicionamiento 10 artículos)
- 1-0105514 Hilo de cerclaje 14/10 largo 550 mm (acondicionamiento 10 artículos)
- 1-0105712 Hilo de cerclaje 12/10 largo 550 mm (acondicionamiento 1 artículo)
- 1-0105714 Hilo de cerclaje 14/10 largo 550 mm (acondicionamiento 1 artículo)
- 1-0102540 Cúpula intermedia Talle 40/22
- 1-0102542 Cúpula intermedia Talle 42/22
- 1-0102544 Cúpula intermedia Talle 44/22
- 1-0102546 Cúpula intermedia Talle 46/22
- 1-0102548 Cúpula intermedia Talle 48/22
- 1-0102550 Cúpula intermedia Talle 50/22
- 1-0102552 Cúpula intermedia Talle 52/22
- 1-0102554 Cúpula intermedia Talle 54/22
- 1-0102556 Cúpula intermedia Talle 56/22
- 1-0102648 Cúpula intermedia Talle 48/28
- 1-0102650 Cúpula intermedia Talle 50/28
- 1-0102652 Cúpula intermedia Talle 52/28



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0102654 Cúpula intermedia Talle 54/28
- 1-0102656 Cúpula intermedia Talle 56/28
- 1-0102658 Cúpula intermedia Talle 58/28
- 1-0102660 Cúpula intermedia Talle 60/28
- 1-0102662 Cúpula intermedia Talle 62/28
- 1-0102664 Cúpula intermedia Talle 64/28
- 1-0106344 Cotilo retentivo para cementar Talle 44/28
- 1-0106346 Cotilo retentivo para cementar Talle 46/28
- 1-0106348 Cotilo retentivo para cementar Talle 48/28
- 1-0106350 Cotilo retentivo para cementar Talle 50/28
- 1-0106352 Cotilo retentivo para cementar Talle 52/28
- 1-0106354 Cotilo retentivo para cementar Talle 54/28
- 1-0106356 Cotilo retentivo para cementar Talle 56/28
- 1-0106358 Cotilo retentivo para cementar Talle 58/28
- 1-0100301 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 1
- 1-0100302 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 2
- 1-0100303 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 3
- 1-0100304 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 4
- 1-0100305 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 5
- 1-0100306 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 6
- 1-0100307 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 7
- 1-0100308 Vástago femoral de revisión INTEGRALE® Talle 8
- 1-0100401 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 1
- 1-0100402 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 2
- 1-0100403 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 3
- 1-0100404 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 4
- 1-0100405 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 5
- 1-0100406 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 6
- 1-0100407 Vástago femoral de revisión GENERIC® para cementar Talle 7
- 0-0103801 Metáfisis estándar EXTREME® con HAP – Talle 1
- 0-0103802 Metáfisis estándar EXTREME® con HAP – Talle 2

..//

- 0-0103803 Metáfisis estándar EXTREME® con HAP - Talle 3
- 0-0103804 Metáfisis estándar EXTREME® con HAP - Talle 4
- 0-0104101 Epífisis EXTREME® - Talle 1
- 0-0104102 Epífisis EXTREME® - Talle 2
- 0-0104103 Epífisis EXTREME® - Talle 3
- 0-0104104 Epífisis EXTREME® - Talle 4
- 0-0104201 Epífisis EXTREME® - Talle 1 con collarete
- 0-0104202 Epífisis EXTREME® - Talle 2 con collarete
- 0-0104203 Epífisis EXTREME® - Talle 3 con collarete
- 0-0104204 Epífisis EXTREME® - Talle 4 con collarete
- 0-0107201 Epífisis-Metáfisis monobloc EXTREME ® con HAP - Talle 1
- 0-0107202 Epífisis-Metáfisis monobloc EXTREME ® con HAP - Talle 2
- 0-0107203 Epífisis-Metáfisis monobloc EXTREME ® con HAP - Talle 3
- 0-0107204 Epífisis-Metáfisis monobloc EXTREME ® con HAP - Talle 4
- 1-0104301 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 10 largo 250 mm
- 1-0104302 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 10 largo 300 mm
- 1-0104303 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 10 largo 350 mm
- 1-0104311 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 12 largo 250 mm
- 1-0104312 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 12 largo 300 mm
- 1-0104313 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 12 largo 350 mm
- 1-0104314 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 12 largo 400 mm
- 1-0104321 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 14 largo 250 mm
- 1-0104322 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 14 largo 300 mm
- 1-0104323 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 14 largo 350 mm
- 1-0104324 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 14 largo 400 mm
- 1-0104331 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 16 largo 250 mm
- 1-0104332 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 16 largo 300 mm
- 1-0104333 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 16 largo 350 mm
- 1-0104334 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 16 largo 400 mm
- 1-0104341 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 18 largo 250 mm
- 1-0104342 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 18 largo 300 mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 1-0104343 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 18 largo 350 mm
- 1-0104344 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 18 largo 400 mm
- 1-0104351 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 20 largo 250 mm
- 1-0104352 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 20 largo 300 mm
- 1-0104353 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 20 largo 350 mm
- 1-0104354 Clavo diafisario EXTREME® con HAP - Ø 20 largo 400 mm
- 1-0105611 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento - Ø 12 largo 250 mm
- 1-0105612 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento - Ø 12 largo 300 mm
- 1-0105613 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento - Ø 12 largo 350 mm
- 1-0105621 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento - Ø 14 largo 250 mm
- 1-0105622 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento - Ø 14 largo 300 mm
- 1-0105623 Clavo diafisario EXTREME® liso sin cemento - Ø 14 largo 350 mm
- 0-0106811 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 12 largo 250 mm
- 0-0106812 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 12 largo 300 mm
- 0-0106821 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 14 largo 250 mm
- 0-0106822 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 14 largo 300 mm
- 0-0106831 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 16 largo 250 mm
- 0-0106832 Clavo diafisario EXTREME® con HAP parcial- Ø 16 largo 300 mm
- 0-0104420 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 20 mm
- 0-0104425 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 25 mm
- 0-0104430 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 30 mm
- 0-0104435 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 35 mm
- 0-0104440 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 40 mm
- 0-0104445 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 45 mm
- 0-0104450 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 50 mm
- 0-0104455 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 55 mm
- 0-0104460 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 60 mm
- 0-0104465 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 65 mm
- 0-0104470 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 70 mm
- 0-0104475 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 75 mm
- 0-0104480 Tornillo de cierre Ø 6.2 largo 80 mm

..//

1-01073R1 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 1 lado derecho Ø 12 lg 200 mm

1-01073R2 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 2 lado derecho Ø 12 lg 200 mm

1-01073R3 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 3 lado derecho Ø 12 lg 200 mm

1-01076R3 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 3 lado derecho Ø 14 lg 200 mm

1-01073R4 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 4 lado derecho Ø 14 lg 200 mm

1-01073R5 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 5 lado derecho Ø 16 lg 200 mm

1-01073L1 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 1 lado izquierdo Ø 12 lg 200 mm

1-01073L2 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 2 lado izquierdo Ø 12 lg 200 mm

1-01073L3 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 3 lado izquierdo Ø 12 lg 200 mm

1-01076L3 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 3 lado izquierdo Ø 14 lg 200 mm

1-01073L4 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 4 lado izquierdo Ø 14 lg 200 mm

1-01073L5 Vástago OPTIMAL® revisión modular sin cemento Talle 5 lado izquierdo Ø 16 lg 200 mm

1-01074R1 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 1 lado derecho Ø 12 lg 250 mm

1-01074R2 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 2 lado derecho Ø 12 lg 250 mm

1-01074R3 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 3 lado derecho Ø 12 lg 250 mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

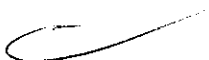
..//

- 1-01077R3 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 3 lado derecho Ø 14 lg 250 mm
- 1-01074R4 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 4 lado derecho Ø 14 lg 250 mm
- 1-01074R5 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 5 lado derecho Ø 16 lg 250 mm
- 1-01074L1 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 1 lado izquierdo Ø 12 lg 250 mm
- 1-01074L2 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 2 lado izquierdo Ø 12 lg 250 mm
- 1-01074L3 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 3 lado izquierdo Ø 12 lg 250 mm
- 1-01077L3 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 3 lado izquierdo Ø 14 lg 250 mm
- 1-01074L4 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 4 lado izquierdo Ø 14 lg 250 mm
- 1-01074L5 Vástago OPTIMAL® reconstrucción modular sin cemento Talle 5 lado izquierdo Ø 16 lg 250 mm
- 1-0107530 Chaveta de cierre para vástago OPTIMAL ® largo 30 mm
- 1-0107535 Chaveta de cierre para vástago OPTIMAL ® largo 35 mm
- 1-0107540 Chaveta de cierre para vástago OPTIMAL ® largo 40 mm
- 1-0107545 Chaveta de cierre para vástago OPTIMAL ® largo 45 mm
- 2-0100201 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 1
- 2-0100202 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 2
- 2-0100203 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 3
- 2-0100204 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 4
- 2-0100205 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 5
- 2-0100206 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 6
- 2-0100207 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 7
- 2-0100208 Raspador femoral de 1ª intervención Talle 8
- 2-0100412 Cabeza de ensayo para vástago Ø 26 Cuello corto

5

..//

2-0100414 Cabeza de ensayo para vástago Ø 26 Cuello largo
2-0100501 Cuello de ensayo Ø 28 Cuello corto
2-0100502 Cuello de ensayo Ø 28 Cuello mediano
2-0100503 Cuello de ensayo Ø 28 Cuello largo
2-0100504 Cuello de ensayo Ø 28 Cuello extra largo
2-0100505 Cuello de ensayo Ø 22.2 Cuello corto
2-0100506 Cuello de ensayo Ø 22.2 Cuello mediano
2-0100507 Cuello de ensayo Ø 22.2 Cuello largo
2-0100508 Cuello de ensayo Ø 32 Cuello corto
2-0100509 Cuello de ensayo Ø 32 Cuello mediano
2-0100510 Cuello de ensayo Ø 32 Cuello largo
2-0100511 Cuello de ensayo Ø 32 Cuello extra largo
2-0201000 Llave de agarre universal
2-0101400 Percutor de cabeza Ø 22.2
2-0103100 Manga porta raspador
2-0102900 Vástago para masa deslizante
2-0103200 Extremidad para masa deslizante de vástago femoral
2-0103300 Cilindro para masa deslizante
2-0114000 Perno suave Ø 2 A/P
2-0103500 Porta escariador
2-0103700 Trocanterómetro
2-0114200 Percutor de cabeza Ø28 y Ø32
2-0101352 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 52/32
2-0101354 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 54/32
2-0101356 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 56/32
2-0101358 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 58/32
2-0101360 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 60/32
2-0101362 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 62/32
2-0101364 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 64/32
2-0101640 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 40/22
2-0101642 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 42/22





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

..//

- 2-0101644 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 44/22
- 2-0101646 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 46/22
- 2-0101648 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 48/22
- 2-0101650 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 50/22
- 2-0101652 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 52/22
- 2-0101654 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 54/22
- 2-0101656 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 56/22
- 2-0101658 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 58/22
- 2-0101660 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 60/22
- 2-0101662 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 62/22
- 2-0101664 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 64/22
- 2-0101748 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 48/28
- 2-0101750 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 50/28
- 2-0101752 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 52/28
- 2-0101754 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 54/28
- 2-0101756 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 56/28
- 2-0101758 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 58/28
- 2-0101760 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 60/28
- 2-0101762 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 62/28
- 2-0101764 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 64/28
- 2-0101852 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 52/32
- 2-0101854 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 54/32
- 2-0101856 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 56/32
- 2-0101858 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 58/32
- 2-0101860 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 60/32
- 2-0101862 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 62/32
- 2-0101864 Inserto de ensayo con reborde para Cotilo Talle 64/32
- 2-0102200 Guía de perforación para broca Ø 3.2
- 2-0102100 Destornillador de cardan H 3.5
- 2-0102700 Medidor de tornillo
- 2-0102800 Pinza porta tornillo

5,

..//

2-0104000 Pinza porta tornillo de fondo de cúpula

2-0104140 Cúpula de ensayo Talle 40

2-0104142 Cúpula de ensayo Talle 42

2-0104144 Cúpula de ensayo Talle 44

2-0104146 Cúpula de ensayo Talle 46

2-0104148 Cúpula de ensayo Talle 48

2-0104150 Cúpula de ensayo Talle 50

2-0100152 Cúpula de ensayo Talle 52

2-0100154 Cúpula de ensayo Talle 54

2-0100156 Cúpula de ensayo Talle 56

2-0100158 Cúpula de ensayo Talle 58

2-0100160 Cúpula de ensayo Talle 60

2-0100162 Cúpula de ensayo Talle 62

2-0100164 Cúpula de ensayo Talle 64

2-0100722 Percutor de núcleo con borde plano Ø 22.2

2-0100728 Percutor de núcleo con borde plano Ø 28

2-0100732 Percutor de núcleo con borde plano Ø 32

2-0101922 Percutor de núcleo con reborde Ø 22.2

2-0101928 Percutor de núcleo con reborde Ø 28

2-0101932 Percutor de núcleo con reborde Ø 32

2-0101500 Destornillador derecho H3.5

2-0101140 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 40/22

2-0101142 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 42/22

2-0101144 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 44/22

2-0101146 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 46/22

2-0101148 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 48/22

2-0101150 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 50/22

2-0101152 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 52/22

2-0101154 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 54/22

2-0101156 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 56/22

2-0101158 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 58/22





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0101160 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 60/22
- 2-0101162 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 62/22
- 2-0101164 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 64/22
- 2-0101248 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 48/28
- 2-0101250 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 50/28
- 2-0101252 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 52/28
- 2-0101254 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 54/28
- 2-0101256 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 56/28
- 2-0101258 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 58/28
- 2-0101260 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 60/28
- 2-0101262 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 62/28
- 2-0101264 Inserto de ensayo con borde plano para Cotilo Talle 64/28
- 2-0102400 Broca Ø 3.2 largo 145 mm
- 2-0103800 Broca corta Ø 3.2 largo 35 mm
- 2-0102500 Broca corta Ø 3.2 largo 50 mm
- 2-0102600 Broca larga Ø 3.2 largo 70 mm
- 2-0103400 Introdutor de obturador diafisario
- 2-0104401 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 48/28
- 2-0104402 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 50/28 y 52/28
- 2-0104403 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 54/28
- 2-0104404 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 56/28 y 58/28
- 2-0104405 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 60/28 y 62/28
- ✓ 2-0104406 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 64/28
- 2-0104501 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 54/32
- 2-0104502 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 56/32 y 58/32
- 2-0104503 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 60/32 y 62/32
- 2-0104504 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 64/32
- 2-0118100 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 50/32 y 52/32
- 2-0116501 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 56/36 y 58/36
- 2-0116502 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 60/36 y 62/36
- 2-0116503 Inserto de ensayo de cerámica – cerámica Talle 64/36

..//

2-0100415 Cabeza de ensayo para vástago Ø36 Cuello corto
2-0100416 Cabeza de ensayo para vástago Ø36 Cuello mediano
2-0100417 Cabeza de ensayo para vástago Ø36 Cuello largo
2-0100512 Cuello de ensayo Ø 36 Cuello corto
2-0100513 Cuello de ensayo Ø 36 Cuello mediano
2-0100514 Cuello de ensayo Ø 36 Cuello largo
2-0100612 Cuello de ensayo de revisión Ø 36 Cuello corto
2-0100613 Cuello de ensayo de revisión Ø 36 Cuello mediano
2-0100614 Cuello de ensayo de revisión Ø 36 Cuello largo
2-0104136 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 36
2-0104336 Extremidad para agarre de cabeza femoral Ø 36
2-0100148 Cúpula de ensayo Talle 48
2-0100150 Cúpula de ensayo Talle 50
2-0100800 Percutor de cúpula
2-0102200 Guía de perforación para broca Ø3.2
2-0102800 Pinza para tornillo
2-0104128 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 28
2-0104132 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 32
2-0107600 Percutor extractor de inserto de cerámica
2-0102400 Broca Ø 3.2 largo 145 mm
2-0103800 Broca larga Ø 3.2 largo 35 mm
2-0102500 Broca larga Ø 3.2 largo 50 mm
2-0102600 Broca larga Ø 3.2 largo 70 mm
2-0102300 Árbol flexible para broca Ø 3.2
2-0105644 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 44/22
2-0105646 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 46/22
2-0105648 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 48/22
2-0105650 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 50/22
2-0105652 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 52/22
2-0105654 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 54/22
2-0105656 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 56/22



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0105658 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 58/22
2-0105660 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 60/22
2-0105662 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 62/22
2-0105664 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 64/22
2-0105666 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 66/22
2-0105748 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 48/28
2-0105750 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 50/28
2-0105752 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 52/28
2-0105754 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 54/28
2-0105756 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 56/28
2-0105758 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 58/28
2-0105760 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 60/28
2-0105762 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 62/28
2-0105764 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 64/28
2-0105766 Inserto de ensayo para Cotilo doble movilidad Talle 66/28
2-0107600 Extractor de inserto
2-0105844 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 44
2-0105846 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 46
2-0105848 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 48
2-0105850 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 50
2-0105852 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 52
2-0105854 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 54
2-0105856 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 56
2-0105858 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 58
2-0105860 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 60
2-0105862 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 62
2-0105864 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 64
2-0105866 Cúpula de ensayo doble movilidad Talle 66
2-0105900 Prensa para Cotilo doble movilidad
2-0106100 Zócalo de mesa para prensa doble movilidad

..//

2-0106400 Extremidad 6 lados H3 para llave universal
2-0106500 Extractor de inserto doble movilidad
2-0107000 Reductor de inserto doble movilidad
2-0107700 Percutor de bomba para cúpula doble movilidad
2-0107800 Manga para percutor doble movilidad
2-0116700 Extensión para percutor doble movilidad
2-0205500 Llave para atornillar
2-0108144 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 44
2-0108146 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 46
2-0108148 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 48
2-0108150 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 50
2-0108152 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 52
2-0108154 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 54
2-0108156 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 56
2-0108158 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 58
2-0108160 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 60
2-0108162 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 62
2-0108164 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 64
2-0108166 Extremidad percutor de cúpula doble movilidad Talle 66
2-0191044 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 44
2-0191046 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 46
2-0191048 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 48
2-0191050 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 50
2-0191052 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 52
2-0191054 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 54
2-0191056 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 56
2-0191058 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 58
2-0191060 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 60
2-0191062 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 62
2-0191064 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 64
2-0191066 Champiñón expansible para percutor de bomba Talle 66

5





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.N.M.S.A.T.

..//

- 2-0191100 Alargador para percutor de bomba
- 2-0192100 Manga para percutor doble movilidad de navegación
- 2-0108900 Herramienta de contorno
- 2-0111400 Percutor final de cúpula doble movilidad
- 2-0112400 Horquilla INITIALE para prensa doble movilidad
- 2-0113100 Horquilla 12/14 para prensa doble movilidad
- 2-0106900 Extractor de cúpula
- 2-0107600 Percutor extractor de inserto de cerámica
- 2-0108200 Broca AO Ø largo 145 mm
- 2-0190700 Cuerpo percutor de cúpula
- 2-0190840 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 40
- 2-0190842 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 42
- 2-0190844 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 44
- 2-0190846 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 46
- 2-0190848 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 48
- 2-0190850 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 50
- 2-0190852 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 52
- 2-0190854 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 54
- 2-0190856 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 56
- 2-0190858 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 58
- 2-0190860 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 60
- 2-0190862 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 62
- 2-0190864 Cúpula de ensayo équateur horizon Talle 64
- 2-0116800 Palpador de navegación para cadera
- 2-0117700 Soporte G para navegación vástago décubitis lateral
- 2-0117701 Soporte G para navegación vástago décubitis dorsal
- 2-0193401 Soporte G para navegación vástago décubitis Anterior Der. / Posterior Izq.
- 2-0193402 Soporte G para navegación vástago décubitis Anterior Izq. / Anterior Der.
- 2-0117801 Manga porta raspador curvo de navegación

S,

..//

- 2-0117100 Sistema de fijación derecho para geometría de navegación
- 2-0117200 Sistema de fijación inclinado para geometría de navegación
- 2-0117300 Cuerpo rígido I cresta iliaca para navegación
- 2-0117400 Cuerpo rígido F fémur para navegación
- 2-0117500 Cuerpo rígido G instrumentación para navegación
- 2-0117600 Llave de agarre universal para navegación
- 2-0208700 Seguro para fijación Ø4 largo 150 mm
- 2-0208702 Seguro para fijación Ø4 largo 100 mm
- 2-0101200 Bloqueo AO para broca auto perforante
- 2-0192500 Porta fresa IMA mecánica / para navegación
- 2-0192940 Fresa para Cotilo Ø 40
- 2-0192944 Fresa para Cotilo Ø 44
- 2-0192946 Fresa para Cotilo Ø 46
- 2-0192948 Fresa para Cotilo Ø 48
- 2-0192950 Fresa para Cotilo Ø 50
- 2-0192952 Fresa para Cotilo Ø 52
- 2-0192954 Fresa para Cotilo Ø 54
- 2-0192956 Fresa para Cotilo Ø 56
- 2-0192958 Fresa para Cotilo Ø 58
- 2-0192960 Fresa para Cotilo Ø 60
- 2-0192962 Fresa para Cotilo Ø 62
- 2-0192964 Fresa para Cotilo Ø 64
- 2-0192966 Fresa para Cotilo Ø 66
- 2-01156D1 Raspador talle 1 derecho para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156D2 Raspador talle 2 derecho para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156D3 Raspador talle 3 derecho para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156D4 Raspador talle 4 derecho para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156D5 Raspador talle 5 derecho para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156D6 Raspador talle 6 derecho para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156D7 Raspador talle 7 derecho para vástago femoral anatómico modular





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-01156G1 Raspador talle 1 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156G2 Raspador talle 2 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156G3 Raspador talle 3 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156G4 Raspador talle 4 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156G5 Raspador talle 5 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156G6 Raspador talle 6 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-01156G7 Raspador talle 7 izquierdo para vástago femoral anatómico modular
- 2-0115700 Extremidad esférica H.5
- 2-0115900 Percutor de vástago femoral modular
- 2-0116000 Extractor de vástago femoral modular
- 2-0116300 Herramienta sacabocado
- 2-0116900 Manga porta raspador derecho para navegación
- 2-0116101 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral / medial 10/12
- 2-0116102 Cuello de ensayo modular para vástago Anterior / Retraído 8° 10/12
- 2-0116103 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral plus / medial plus 10/12
- 2-0116104 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral / medial +7 10/12
- 2-0116105 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral / medial +10.5 10/12
- 2-0116401 Cuello de ensayo modular para raspador – LATERAL 10/12
- 2-0116402 Cuello de ensayo modular para raspador – MEDIAL 10/12
- 2-0116403 Cuello de ensayo modular para raspador – LATERAL PLUS 10/12
- 2-0116404 Cuello de ensayo modular para raspador – MEDIAL PLUS 10/12



..//

2-0116405 Cuello de ensayo modular para raspador – ANTE izquierdo / RETRA derecho 8° 10/12

2-0116406 Cuello de ensayo modular para raspador – ANTE derecho / RETRA izquierdo 8° LATERAL 10/12

2-0116407 Cuello de ensayo modular para raspador – LATERAL +7 10/12

2-0116408 Cuello de ensayo modular para raspador – MEDIAL +7 10/12

2-0116409 Cuello de ensayo modular para raspador – LATERAL +10.5 10/12

2-0116410 Cuello de ensayo modular para raspador – MEDIAL +10.5 10/12

2-0116200 Colocador de cuello modular

2-0191800 Colocador de cuello modular 12/14

2-0191400 Percutor final de cuello modular 12/14

2-0118400 Llave 19

2-0115800 Percutor de cabeza y cuello modular 10/12

2-0196800 Percutor de cabeza y cuello modular 12/14

2-0104328 Extremidad para agarre de cabeza femoral Ø 28

2-0191201 Cuello de prueba modular para vástago Lateral / Medial 12/14

2-0191202 Cuello de prueba modular para vástago Anterior/ Retraído 8° 12/14

2-0191203 Cuello de prueba modular para vástago Lateral plus / Medial plus 12/14

2-0191205 Cuello de prueba modular para vástago Lateral / Medial +10.5 12/14

2-0191301 Cuello de prueba modular para vástago LATERAL 12/14

2-0191302 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL 12/14

2-0191303 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL PLUS 12/14

2-0191304 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL PLUS 12/14

2-0191305 Cuello de prueba modular para raspador ANTE izquierdo / RETRA derecho 8° 12/14

2-0191306 Cuello de prueba modular para raspador ANTE derecho / RETRA izquierdo 8° 12/14

2-0191309 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL 12/14 + 10.5



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0191310 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL 12/14 +10.5
- 2-0197101 Cuello de prueba modular para vástago Lateral / medial 12/14
- 2-0197102 Cuello de prueba modular para vástago Anterior / Retraído 8°
12/14
- 2-0197103 Cuello de prueba modular para vástago Lateral plus / Medial plus
12/14
- 2-0197104 Cuello de prueba modular para vástago Lateral / Medial +10.5
12/14
- 2-0197201 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL 12/14
- 2-0197202 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL 12/14
- 2-0197203 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL PLUS 12/14
- 2-0197204 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL PLUS 12/14
- 2-0197205 Cuello de prueba modular para raspador ANTE izquierdo / RETRA
derecho 8° 12/14
- 2-0197206 Cuello de prueba modular para raspador ANTE derecho / RETRA
izquierdo 8° 12/14
- 2-0197207 Cuello de prueba modular para raspador LATERAL +10.5 12/14
- 2-0197208 Cuello de prueba modular para raspador MEDIAL +10.5 12/14
- 2-0196101 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 28 cuello corto
- 2-0196102 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 28 cuello mediano
- 2-0196103 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 28 cuello largo
- 2-0196104 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 22.2 cuello corto
- 2-0196105 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 22.2 cuello mediano
- 2-0196106 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 22.2 cuello largo
- 2-0196107 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 32 cuello corto
- 2-0196108 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 32 cuello mediano
- 2-0196109 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 32 cuello largo
- 2-0196110 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 36 cuello corto
- 2-0196111 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 36 cuello mediano
- 2-0196112 Cabeza de ensayo 12/14 Ø 36 cuello largo
- 2-0100201 Raspador femoral de primera intervención Talle 1

..//

2-0100202 Raspador femoral de primera intervención Talle 2
2-0100203 Raspador femoral de primera intervención Talle 3
2-0100204 Raspador femoral de primera intervención Talle 4
2-0100205 Raspador femoral de primera intervención Talle 5
2-0100206 Raspador femoral de primera intervención Talle 6
2-0100207 Raspador femoral de primera intervención Talle 7
2-0108600 Porta Cotilo corto
2-0108700 Orientador de porta Cotilo corto
2-0105122 Extremidad esférica Ø 22.2
2-0105128 Extremidad esférica Ø 28
2-0105240 Señuelo cotiloideo Ø 37/40
2-0105242 Señuelo cotiloideo Ø 38.5/42
2-0105244 Señuelo cotiloideo Ø 40/44
2-0105246 Señuelo cotiloideo Ø 41.5/46
2-0105248 Señuelo cotiloideo Ø 43/48
2-0105250 Señuelo cotiloideo Ø 44.5/50
2-0105252 Señuelo cotiloideo Ø 46/52
2-0105254 Señuelo cotiloideo Ø 47.5/54
2-0105256 Señuelo cotiloideo Ø 49/56
2-0105258 Señuelo cotiloideo Ø 51/58
2-0105260 Señuelo cotiloideo Ø 53/60
2-0105340 Cotilo de ensayo Ø 22.2/37/40
2-0105342 Cotilo de ensayo Ø 22.2/38.5/42
2-0105344 Cotilo de ensayo Ø 22.2/40/44
2-0105346 Cotilo de ensayo Ø 22.2/41.5/46
2-0105348 Cotilo de ensayo Ø 22.2/43/48
2-0105350 Cotilo de ensayo Ø 22.2/44.5/50
2-0105352 Cotilo de ensayo Ø 22.2/46/52
2-0105354 Cotilo de ensayo Ø 22.2/47.5/54
2-0105356 Cotilo de ensayo Ø 22.2/49/56
2-0105358 Cotilo de ensayo Ø 22.2/51/58



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0105360 Cotilo de ensayo Ø 22.2/53/60
- 2-0105448 Cotilo de ensayo Ø 28/43/48
- 2-0105450 Cotilo de ensayo Ø 28/44.5/50
- 2-0105452 Cotilo de ensayo Ø 28/46/52
- 2-0105454 Cotilo de ensayo Ø 28/47.5/54
- 2-0105456 Cotilo de ensayo Ø 28/49/56
- 2-0105458 Cotilo de ensayo Ø 28/51/58
- 2-0105460 Cotilo de ensayo Ø 28/53/60
- 2-0105540 Arandela con uña Ø 37/40
- 2-0105542 Arandela con uña Ø 38.5/42
- 2-0105544 Arandela con uña Ø 40/44
- 2-0105546 Arandela con uña Ø 41.5/46
- 2-0105548 Arandela con uña Ø 43/48
- 2-0105550 Arandela con uña Ø 44.5/50
- 2-0105552 Arandela con uña Ø 46/52
- 2-0105554 Arandela con uña Ø 47.5/54
- 2-0105556 Arandela con uña Ø 49/56
- 2-0105558 Arandela con uña Ø 51/58
- 2-0105560 Arandela con uña Ø 53/60
- 2-0104900 Porta Cotilo
- 2-0105000 Orientador de porta Cotilo
- 2-0190101 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 101S
- 2-0190102 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 102S
- 2-0190201 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 201S
- 2-0190202 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 202S
- 2-0190203 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 203S
- 2-0190301 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 301S
- 2-0190302 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 302S
- 2-0190303 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 303S
- 2-0190401 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 401S
- 2-0190402 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 402S

27

..//

2-0190403 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 403S
2-0190501 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 501S
2-0190502 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 502S
2-0190601 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 601S
2-0190602 Vástago femoral de ensayo INITIALE® monobloc 22.2 N° 602S
2-0180101 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 101S
2-0180102 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 102S
2-0180201 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 201S
2-0180202 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 202S
2-0180203 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 203S
2-0180301 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 301S
2-0180302 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 302S
2-0180303 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 303S
2-0180401 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 401S
2-0180402 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 402S
2-0180403 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 403S
2-0180501 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 501S
2-0180502 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 502S
2-0180601 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 601S
2-0180602 Vástago femoral de ensayo INITIALEØ N° 602S
2-0104700 Árbol de extracción de mana de raspador
2-0170101 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 101S
2-0170102 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 102S
2-0170201 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 201S
2-0170202 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 202S
2-0170203 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 203S
2-0170301 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 301S
2-0170302 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 302S
2-0170303 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 303S
2-0170401 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 401S
2-0170402 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 402S



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.N.M.S.A.T.

..//

- 2-0170403 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 403S
- 2-0170501 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 501S
- 2-0170502 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 502S
- 2-0170601 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 601S
- 2-0170602 Raspador para vástago femoral INITIALE® N° 602S
- 2-0104800 Percutor para vástago femoral
- 2-0107100 Porta prótesis femoral
- 2-0100413 Cabeza de ensayo para vástago Ø 26 cuello mediano
- 2-0106800 Cabeza de ensayo femoral INITIALE ® 0
- 2-0106804 Cabeza de ensayo femoral INITIALE ® +4
- 2-0106803 Cabeza de ensayo femoral INITIALE ® -3
- 2-0106700 Extractor de vástago de ensayo
- 2-0118306 Llave plana 6 mm (Inox)
- 2-0118308 Llave plana 8 mm (Inox)
- 2-0104322 Extremidad para agarre de cabeza femoral Ø 22.2
- 2-0160121 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 121
D
- 2-0160221 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 221
D
- 2-0160321 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 321
D
- 2-0160421 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 421
D
- 2-0160521 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 521
D
- 2-0160511 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 511
D
- 2-0160531 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® monobloc N° 531
D
- 2-0150121 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N° 121
D

5

..//

2-0150221 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N° 221
D

2-0150321 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N° 321
D

2-0150421 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N° 421
D

2-0150521 Vástago femoral de ensayo displásico INITIALE® modular N° 521
D

2-0140121 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 121 D

2-0140221 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 221 D

2-0140321 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 321 D

2-0140421 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 421 D

2-0140521 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 521 D

2-0140511 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 511 D

2-0140531 Raspador para vástago femoral displásico INITIALE® N° 531 D

2-0130220 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
202 largo 200 mm

2-0130225 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
202 largo 250 mm

2-0130230 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
202 largo 300 mm

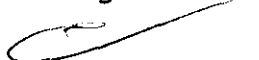
2-0130235 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
202 largo 350 mm

2-0130320 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
302 largo 200 mm

2-0130325 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
302 largo 250 mm

2-0130330 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
302 largo 300 mm

2-0130335 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
302 largo 350 mm





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0130420 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
402 largo 200 mm
- 2-0130425 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
402 largo 250 mm
- 2-0130430 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
402 largo 300 mm
- 2-0130435 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
402 largo 350 mm
- 2-0130520 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
501 largo 200 mm
- 2-0130525 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
501 largo 250 mm
- 2-0130530 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
501 largo 300 mm
- 2-0120535 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® monobloc N°
501 largo 350 mm
- 2-0120220 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
202 largo 200 mm
- 2-0120225 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
202 largo 250 mm
- 2-0120230 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
202 largo 300 mm
- 2-0120235 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 350 mm
- 2-0120320 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 200 mm
- 2-0120325 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 250 mm
- 2-0120330 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 300 mm

5

..//

2-0120335 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
302 largo 350 mm

2-0120420 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
402 largo 200 mm

2-0120425 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
402 largo 250 mm

2-0120430 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
402 largo 300 mm

2-0120435 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
402 largo 350 mm

2-0120520 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
501 largo 200 mm

2-0120525 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
501 largo 250 mm

2-0120530 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
501 largo 300 mm

2-0120535 Vástago femoral de ensayo de revisión INITIALE® modular N°
501 largo 350 mm

2-0192411 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 101S

2-0192412 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 102S

2-0192421 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 201S

2-0192422 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 202S

2-0192423 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 203S

2-0192431 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 301S

2-0192432 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 302S

2-0192433 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 303S

2-0192441 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 401S

2-0192442 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 402S

2-0192443 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 403S

2-0192451 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 501S

2-0192452 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 502S



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0192461 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 601S
- 2-0192462 Raspador de navegación para vástago femoral INITIALE® N° 602S
- 2-0117702 Soporte G para navegación Vástago INITIALE® modular décubitus lateral
- 2-0117703 Soporte G para navegación Vástago INITIALE® modular décubitus dorsal
- 2-0103612 Escariador 12 X 10
- 2-0103618 Escariador 18 X 10
- 2-0197511 Raspador INITIALE® Talle 101 sin Trocanterómetro
- 2-0197512 Raspador INITIALE® Talle 102 sin Trocanterómetro
- 2-0197521 Raspador INITIALE® Talle 201 sin Trocanterómetro
- 2-0197522 Raspador INITIALE® Talle 202 sin Trocanterómetro
- 2-0197523 Raspador INITIALE® Talle 203 sin Trocanterómetro
- 2-0197531 Raspador INITIALE® Talle 301 sin Trocanterómetro
- 2-0197532 Raspador INITIALE® Talle 302 sin Trocanterómetro
- 2-0197533 Raspador INITIALE® Talle 303 sin Trocanterómetro
- 2-0197541 Raspador INITIALE® Talle 401 sin Trocanterómetro
- 2-0197542 Raspador INITIALE® Talle 402 sin Trocanterómetro
- 2-0197543 Raspador INITIALE® Talle 403 sin Trocanterómetro
- 2-0197551 Raspador INITIALE® Talle 501 sin Trocanterómetro
- 2-0197552 Raspador INITIALE® Talle 502 sin Trocanterómetro
- 2-0197561 Raspador INITIALE® Talle 601 sin Trocanterómetro
- 2-0197562 Raspador INITIALE® Talle 602 sin Trocanterómetro
- 2-0109000 Manga porta fresa cilíndrica
- 2-0109110 Fresa cilíndrica Ø 10
- 2-0109112 Fresa cilíndrica Ø 12
- 2-0109114 Fresa cilíndrica Ø 14
- 2-0109116 Fresa cilíndrica Ø 16
- 2-0109118 Fresa cilíndrica Ø 16
- 2-0200100 Broca intramedular
- 2-0100140 Cúpula de ensayo talle 40

5,

..//

- 2-0100142 Cúpula de ensayo talle 42
- 2-0100144 Cúpula de ensayo talle 44
- 2-0100146 Cúpula de ensayo talle 46
- 2-0100722 Percutor de núcleo con borde plano Ø22.2
- 2-0100728 Percutor de núcleo con borde plano Ø28
- 2-0100732 Percutor de núcleo con borde plano Ø32
- 2-0101922 Percutor de núcleo con reborde Ø 22.2
- 2-0101928 Percutor de núcleo con reborde Ø 28
- 2-0101932 Percutor de núcleo con reborde Ø 32
- 2-0102000 Orientador de cúpula
- 2-0104122 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 22.2
- 2-0104128 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 28
- 2-0104132 Extremidad percutor final de Cotilo Ø 32
- 2-0107440 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T37/40 D. EXT 44
- 2-0107444 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T40/44 D. EXT 48
- 2-0107448 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T43/48 D. EXT 52
- 2-0107452 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T46/52 D. EXT 56
- 2-0107456 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T49/56 D. EXT 60
- 2-0107460 Fondo de Cotilo de ensayo derecho para Cotilo T53/60 D. EXT 64
- 2-0107540 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T37/40 D. EXT 44
- 2-0107544 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T40/44 D. EXT 48
- 2-0107548 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T43/48 D. EXT 52
- 2-0107552 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T46/52 D. EXT 56
- 2-0107556 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T49/56 D. EXT 60
- 2-0107560 Fondo de Cotilo de ensayo izquierdo para Cotilo T53/60 D. EXT 64
- 2-0108800 Herramienta de agarre para fondo de Cotilo
- 2-0104600 Pinza para tope de retención
- 2-0101000 Llave de agarre universal
- 2-0103900 Manga orientadora de núcleo
- 2-0114400 Percutor para Cotilo para cementar de retención
- 2-0100301 Raspador femoral de revisión talle 1





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0100302 Raspador femoral de revisión talle 2
- 2-0100303 Raspador femoral de revisión talle 3
- 2-0100304 Raspador femoral de revisión talle 4
- 2-0100305 Raspador femoral de revisión talle 5
- 2-0100306 Raspador femoral de revisión talle 6
- 2-0100307 Raspador femoral de revisión talle 7
- 2-0100308 Raspador femoral de revisión talle 8
- 2-0100411 Cabeza de ensayo para vástago Ø 32 cuello extra largo
- 2-0100601 Cuello de ensayo de revisión Ø 28 cuello corto
- 2-0100602 Cuello de ensayo de revisión Ø 28 cuello mediano
- 2-0100603 Cuello de ensayo de revisión Ø 28 cuello largo
- 2-0100604 Cuello de ensayo de revisión Ø 28 cuello extra largo
- 2-0100605 Cuello de ensayo de revisión Ø 22.2 cuello corto
- 2-0100606 Cuello de ensayo de revisión Ø 22.2 cuello mediano
- 2-0100607 Cuello de ensayo de revisión Ø 22.2 cuello largo
- 2-0100608 Cuello de ensayo de revisión Ø 32 cuello corto
- 2-0100609 Cuello de ensayo de revisión Ø 32 cuello mediano
- 2-0100610 Cuello de ensayo de revisión Ø 32 cuello largo
- 2-0100611 Cuello de ensayo de revisión Ø 32 cuello extra largo
- 2-0100900 Percutor de vástago
- 2-0103700 Trocanterómetro
- 2-0104200 Empuñadura de sostén
- 2-0104332 Extremidad para agarre de cabeza femoral Ø32
- 2-0112200 Galga de calibración intramedular
- 2-0111000 Regla milimétrica de 300 mm
- 2-0112300 Calibrador de escariador
- 2-0110800 Herramienta de ranurado guía de fresa para trocánter
- 2-0111900 Fresa para clavo diafisario Ø 10 y Ø 12
- 2-0110400 Tuerca de bloqueo para dispositivo de ensayo
- 2-0111101 Clavo diafisario de ensayo Ø 10 largo 250 mm
- 2-0111102 Clavo diafisario de ensayo Ø 10 largo 300 mm

5

..//

2-0111103 Clavo diafisario de ensayo Ø 10 largo 350 mm
2-0111111 Clavo diafisario de ensayo Ø 12 largo 250 mm
2-0111112 Clavo diafisario de ensayo Ø 12 largo 300 mm
2-0111113 Clavo diafisario de ensayo Ø 12 largo 350 mm
2-0111114 Clavo diafisario de ensayo Ø 12 largo 400 mm
2-0111121 Clavo diafisario de ensayo Ø 14 largo 250 mm
2-0111122 Clavo diafisario de ensayo Ø 14 largo 300 mm
2-0111123 Clavo diafisario de ensayo Ø 14 largo 350 mm
2-0111124 Clavo diafisario de ensayo Ø 14 largo 400 mm
2-0111131 Clavo diafisario de ensayo Ø 16 largo 250 mm
2-0111132 Clavo diafisario de ensayo Ø 16 largo 300 mm
2-0111133 Clavo diafisario de ensayo Ø 16 largo 350 mm
2-0111134 Clavo diafisario de ensayo Ø 16 largo 400 mm
2-0111141 Clavo diafisario de ensayo Ø 18 largo 250 mm
2-0111142 Clavo diafisario de ensayo Ø 18 largo 300 mm
2-0111143 Clavo diafisario de ensayo Ø 18 largo 350 mm
2-0111144 Clavo diafisario de ensayo Ø 18 largo 400 mm
2-0111151 Clavo diafisario de ensayo Ø 20 largo 250 mm
2-0111152 Clavo diafisario de ensayo Ø 20 largo 300 mm
2-0111153 Clavo diafisario de ensayo Ø 20 largo 350 mm
2-0111154 Clavo diafisario de ensayo Ø 20 largo 400 mm
2-0111701 Metáfisis estándar de ensayo talla 1
2-0111702 Metáfisis estándar de ensayo talla 2
2-0111703 Metáfisis estándar de ensayo talla 3
2-0111704 Metáfisis estándar de ensayo talla 4
2-0111711 Metáfisis de ensayo desfasado talla 1 DP/GA
2-0111712 Metáfisis de ensayo desfasado talla 2 DP/GA
2-0111713 Metáfisis de ensayo desfasado talla 3 DP/GA
2-0111714 Metáfisis de ensayo desfasado talla 4 DP/GA
2-0111721 Metáfisis de ensayo desfasado talla 1 DA/GP
2-0111722 Metáfisis de ensayo desfasado talla 2 DA/GP





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0111723 Metáfisis de ensayo desfasado talle 3 DA/GP
- 2-0111724 Metáfisis de ensayo desfasado talle 4 DA/GP
- 2-0111801 Epífisis de ensayo talle 1
- 2-0111802 Epífisis de ensayo talle 2
- 2-0111803 Epífisis de ensayo talle 3
- 2-0111804 Epífisis de ensayo talle 4
- 2-0111811 Epífisis de ensayo talle 1 con collarete
- 2-0111812 Epífisis de ensayo talle 2 con collarete
- 2-0111813 Epífisis de ensayo talle 3 con collarete
- 2-0111814 Epífisis de ensayo talle 4 con collarete
- 2-0110700 Alargador para clavo diafisario
- 2-0110100 Destornillador derecho H5
- 2-0109401 Manga de raspador metafisario monobloc talle 1
- 2-0109402 Manga de raspador metafisario monobloc talle 2
- 2-0109403 Manga de raspador metafisario monobloc talle 3
- 2-0109404 Manga de raspador metafisario monobloc talle 4
- 2-0103000 Perno suave Ø 2
- 2-0109900 Agarre de pieza de ensayo
- 2-0109200 Alargador para clavo diafisario implantable
- 2-0109800 Brazo de manipulación
- 2-0109500 Guía de cierre
- 2-0109700 Tornillo de mantenimiento para brazo de manipulación
- 2-0109600 Placa guía de perforación
- 2-0111500 Tope de bloqueo para broca
- 2-0111200 Medidor de tornillo
- 2-0111300 Tornillo de bloqueo para pieza de ensayo
- 2-0112000 Percutor de metáfisis EXTREME
- 2-0112100 Percutor de epífisis EXTREME
- 2-0191600 Percutor de epífisis EXTREME y metáfisis monobloc
- 2-0110200 Extractor de epífisis
- 2-0110300 Extracto de metáfisis

..//

- 2-0118700 Extractor de metáfisis antes del 2000
- 2-0111920 Vástago extractor de epífisis metáfisis monobloc
- 2-0110500 Eje de mantenimiento
- 2-0113400 Galga de impacción metafisaria
- 2-0191500 Medidor de impacción epífisis metáfisis monobloc
- 2-0113700 Extremidad extractor de pieza de ensayo
- 2-0114100 Porta prótesis EXTREME
- 2-0119900 Porta prótesis EXTREME monobloc
- 2-0191900 Empuñadura fija largo 150
- 2-0118200 Placa de impacción para vástago femoral de reconstrucción
- 2-0191700 Llave de mantenimiento epífisis EXTREME®
- 2-0119103 Vástago para llave dinamométrica H5
- 2-0111600 Broca para tornillo de cierre
- 2-0197300 Guía de ranurado para escariador flexible Ø 3 largo 500 mm
- 2-0195701 Raspador talla 1 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195702 Raspador talla 2 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195703 Raspador talla 3 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195713 Raspador talla 3 Ø 14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195704 Raspador talla 4 Ø 14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195715 Raspador talla 5 Ø 14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195705 Raspador talla 5 Ø 16 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195801 Raspador talla 1 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195802 Raspador talla 2 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195803 Raspado talla 3 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195813 Raspador talla 3 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195804 Raspador talla 4 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195815 Raspador talla 5 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195805 Raspador talla 5 Ø 16 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0195901 Vástago de ensayo talla 1 Ø 12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195902 Vástago de ensayo talla 2 Ø12 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195903 Vástago de ensayo talla 3 Ø12 derecho para vástago OPTIMAL



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

- 2-0195913 Vástago de ensayo talle 3 Ø14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195904 Vástago de ensayo talle 4 Ø14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195915 Vástago de ensayo talle 5 Ø14 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0195905 Vástago de ensayo talle 5 Ø16 derecho para vástago OPTIMAL
- 2-0196001 Vástago de prueba talle 1 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196002 Vástago de prueba talle 2 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196003 Vástago de prueba talle 3 Ø 12 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196013 Vástago de prueba talle 3 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196004 Vástago de prueba talle 4 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196015 Vástago de prueba talle 5 Ø 14 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196005 Vástago de prueba talle 5 Ø 16 izquierdo para vástago OPTIMAL
- 2-0196900 Extractor de vástago femoral modular
- 2-0116300 Tijeras sacabocado
- 2-0116102 Cuello de ensayo modular para vástago Anterior / retraído 8 °10/12
- 2-0116105 Cuello de ensayo modular para vástago Lateral / Medial +10.5 10/12
- 2-0116401 Cuello de ensayo modular para vástago LATERAL 10/12
- 2-0116402 Cuello de ensayo modular para vástago MEDIAL 10/12
- 2-0116403 Cuello de ensayo modular para vástago LATERAL PLUS 10/12
- 2-0116404 Cuello de ensayo modular para vástago MEDIAL PLUS 10/12
- 2-0116405 Cuello de ensayo modular para vástago ANTE izquierdo/ RETRA derecho 8° 10/12
- 2-0116406 Cuello de ensayo modular para vástago ANTE derecho / RETRA izquierdo 8° 10/12
- 2-0116407 Cuello de ensayo modular para vástago LATERAL +7l 10/12
- 2-0116408 Cuello de ensayo modular para vástago MEDAL +7 10/12
- 2-0116409 Cuello de ensayo modular para vástago - LATERAL +10.5 10/12
- 2-0116410 Cuello de ensayo modular para vástago - MEDIAL +10.5 10/12
- 2-0100401 Cabeza de ensayo para vástago Ø cuello corto
- 2-0100402 Cabeza de ensayo para vástago Ø cuello mediano

5,

..//

- 2-0100403 Cabeza de ensayo para vástago Ø cuello largo
- 2-0100404 Cabeza de ensayo para vástago Ø cuello extra largo
- 2-0100405 Cabeza de ensayo para vástago Ø 22.2 cuello corto
- 2-0100406 Cabeza de ensayo para vástago Ø 22.2 cuello mediano
- 2-0100407 Cabeza de ensayo para vástago Ø 22.2 cuello largo
- 2-0100408 Cabeza de ensayo para vástago Ø 32 cuello corto
- 2-0100409 Cabeza de ensayo para vástago Ø 32 cuello mediano
- 2-0100410 Cabeza de ensayo para vástago Ø 32 cuello largo
- 2-0115800 Percutor de cabeza y cuello modular
- 2-0109300 Empuñadura fija
- 2-0110600 Clavo pulido
- 2-0111500 Tope fijo para broca
- 2-0197700 Medidor de chaveta optimal
- 2-0197800 Destornillador H5 corto para cierre optimal
- 2-0197900 Destornillador H5 largo para cierre optimal
- 2-0110000 Destornillador H5 de cierre
- 2-0196200 Percutor orientador de vástago optimal
- 2-0196300 Porta prótesis de vástago optimal
- 2-0196400 Brazo de manipulación de vástago optimal
- 2-0196500 Tornillo de apriete del marco de atornillamiento para vástago optimal
- 2-0196700 Marco de atornillamiento para vástago optimal
- 2-0197012 Escariador guía de fresa para trocánter 12X10
- 2-0197018 Escariador guía de fresa para trocánter 18X10
- 2-0110900 Fresa para trocánter
- 2-0196600 Broca para chaveta de vástago optimal N° 1
- 2-0198000 Broca para chaveta de vástago optimal N° 2
- 2-0118800 Cuerpo percutor de cúpula THA.HY.TI.BJR
- 2-0118000 Porta fresa derecho navegación
- 2-0116800 Palpador navegación cadera

5,





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

..//

2-0119000 Soporte G para navegación vástago décubitus lateral THA.HY.TI
BJR

2-0118900 Soporte G para navegación vástago décubitus dorsal THA.HY.TI
BJR

2-0116600 Soporte CR adquisición eje de escariador

2-0117100 Sistema de fijación derecho de geometría de navegación

2-0117200 Sistema de fijación inclinad de geometría de navegación

2-0200800 Destornillador H5

2-0117300 Cuerpo rígido I cresta iliaca de navegación

2-0117400 Cuerpo rígido F fémur de navegación

2-0117600 Llave de agarre universal

2-0208700 Seguro para fijación Ø 4 largo 150 mm

2-0208702 Seguro para fijación Ø 4 largo 100 mm

2-0201100 Bloqueo universal para broca auto perforante

2-0201200 Bloqueo universal AO para broca auto perforante

3-0400-901 MARCADORES AMPLIVISION estériles (acondicionados en grupos de 7)

3-0400-902 MARCADORES AMPLIVISION estériles (acondicionados en grupos de 14)

0-0223700 Brocas AMPLIVISION Ø 4 Lg 150 mm estériles (acondicionados en grupos de 4)

3-0401001 Estación AMPLIVISION

3-0402001 Opción "soporte móvil"

3-0401401 Software PTH

3-0401402 Software PTH (opción BJR)

3-0401403 Software PTH INITIALE

Período de vida útil: 10 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

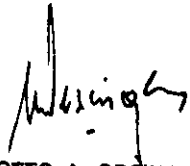
Nombre del fabricante: SOCIETE AMPLITUDE.

..//

Lugar/es de elaboración: 11 Cours Jacques Offenbach, Zone Mozart 2, 26000
Valence, Francia.

Se extiende a OSTEOLIFE S.R.L. el Certificado PM-940-106, en la Ciudad de
Buenos Aires, a ^{16 FEB 2012}....., siendo su vigencia por cinco (5) años a
contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N° **0984**


Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.