



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

"2017 – Año de las Energías Renovables"

DISPOSICIÓN N° 1569

BUENOS AIRES, 14 FEB. 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-003252-16-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones MEDIBEL S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

"2017 - Año de las Energías Renovables"

DISPOSICIÓN N° 1569

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Arago, nombre descriptivo SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE ESTERIL DE POLIPROPILENO y nombre técnico Suturas, Monofilares de Polipropileno, de acuerdo con lo solicitado por MEDIBEL S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 71 y de 72 a 75 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-1208-51, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

E
1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

"2017 - Año de las Energías Renovables"

DISPOSICIÓN N° 1569

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-003252-16-2


DISPOSICIÓN N°

MD

1569


Dr. ROBERTO LEBE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

156

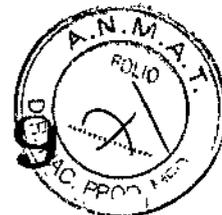

ANEXO III B

14 FEB. 2017

PROYECTO DE ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO

PROYECTO DE ROTULOS

Razón social del fabricante: LABORATORIO ARAGÓ S.L

Dirección del fabricante: Calle Salvador Mundí, N° 11, 08017 Barcelona, España.

Lugar de elaboración: Carretera de Granollers A Cardeu KM. 3,5 – 08520 – Les Franqueses del Valles, Barcelona, España.

Razón social del importador: MEDIBEL S.A.

Dirección del importador: Nicolás Repetto 1656 Dto. 3 (1416) Ciudad autónoma de Bs.As. - www.medibel.com.ar

Producto: Sutura sintética no absorbible estéril Polipropileno

Modelo: Polipropileno ARAGO

Marca: Aragó

Lote: X/ XXX/ XX: letra asignada según año de fabricación/ n° correlativo/ año de fabricación

Fecha de fabricación: AAAA/MM

Fecha de vencimiento: AAAA/MM

Producto de un solo uso

Preservar de la luz solar

Producto Estéril

Esterilizado por óxido de etileno

No utilizar si el envase unitario está abierto o deteriorado

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Directo Técnico: Farmacéutica Marta Beatriz ALMIRÓN – MN 10321

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM-1208-51

CE 0318

E

MEDIBEL S.A.
PRESIDENTE
JORGE A. BELLAGAMBA
DNI 23050304


DIEGO ARIEL BOTTA
Fong. Mat. 5195
D.N.I. 17.705.247
DIRECTOR TÉCNICO


Marta Beatriz Almirón
Farmacéutica
M.N. 10321
Directora Técnica

1569



INSTRUCCIONES DE USO

3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítem 2.4 y 2.5;

Razón social del fabricante: LABORATORIO ARAGÓ S.L

Dirección del fabricante: Calle Salvador Mundí, N° 11, 08017 Barcelona, España.

Lugar de elaboración: Carretera de Granollers A Cardeu KM. 3,5 – 08520 – Les Franqueses del Valles, Barcelona, España.

Razón social del importador: MEDIBEL S.A.

Dirección del importador: Nicolás Repetto 1656 Dto. 3 (1416) Ciudad autónoma de Bs.As. - www.medibel.com.ar

Producto: Sutura sintética no absorbible estéril Polipropileno

Modelo: Polipropileno ARAGO

Marca: Aragón

Producto de un solo uso

Preservar de la luz solar

Producto Estéril

Esterilizado por óxido de etileno

No utilizar si el envase unitario está abierto o deteriorado

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Directo Técnico: Farmacéutica Marta Beatriz ALMIRÓN – MN 10321

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM-1208-51 CE 0318

3.2. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados;

Indicaciones:

Las Suturas están indicadas para ligar los vasos sanguíneos o aproximar los tejidos hasta que el proceso natural de cicatrización esté suficientemente bien establecido. Las suturas no absorbibles no se degradan o lo hacen en un período de varios años. La reacción inflamatoria es mínima, resultando en una encapsulación del material de sutura por fibroblastos. Mantienen sus propiedades por largos períodos y retienen la mayoría de su fuerza tensil más allá de los 60 días de implantación.

El Polipropileno Aragón es una sutura - ligadura sintética, para uso quirúrgico, estéril, no absorbible, monofilar, a base de granza de polipropileno. Para mejor visibilidad el hilo ha sido coloreado con colorante autorizado azul.

Está indicado para aplicar cuando el procedimiento quirúrgico requiera el uso de un material de sutura no absorbible, posee una gran resistencia, una reacción tisular mínima, gran inercia química y biológica y gran seguridad en el anudado.

Se aplica a cirugía cardiovascular, gastrointestinal, plástica, ortopédica y para el cierre subcutáneo de heridas debido a ser especialmente no trombogénico.

MEDIBEL S.A.
PRESIDENTE
JORGE A. BELLAGAMP
DNI 23049302

DIEGO ARIEL BOTTA
Díng. Mat. 5195
D.N.I. 17 705.247
DIRECTOR TÉCNICO

Marta Beatriz Almirón
Farmacéutica
M.N. 10321
Directora Técnica

1569



Cuando hay infección no se involucra en el proceso, por lo que se puede utilizar exitosamente en heridas contaminadas.

Dentro de las suturas no absorbibles, el polipropileno mantiene su resistencia original durante años, siendo de gran utilidad donde se requiera una resistencia elevada durante largos períodos de tiempo.

Estructura: monofilamento de polipropileno

Composición: polipropileno

Color: azul

Esterilización: óxido de etileno

Absorción: no absorbible. Permanece encapsulado en el organismo de forma indefinida.

Aplicación: cirugía general, cirugía plástica, cirugía cardiovascular y reparación de nervios, aponeurosis, pared abdominal, anastomosis vasculares y hernias.

Contraindicaciones:

No se conocen.

Advertencias

- No usar si el embalaje está dañado.
- Almacenar en un lugar fresco y seco
- No reesterilizar.
- Compruebe la integridad del envase esterilizado antes de su uso.
- No vuelva a usar el dispositivo, ya que esto puede conducir a la infección con el usuario y paciente
- La ausencia de etiquetado e instrucciones en el punto de uso, conlleva a utilizar el producto más allá de su caducidad y se pierde su trazabilidad.

Precauciones:

Al igual que para todos los hilos de suturas, se debe tener cuidado en la manipulación del hilo. Vigilar no dañarlo con los instrumentos quirúrgicos, pinzas o porta aguja. El usuario debe

conocer las técnicas quirúrgicas relativas a la utilización de las suturas Arago

Efectos secundarios:

Al igual que con cualquier material de sutura, el contacto prolongado con soluciones salinas, tales como la orina y la bilis, puede provocar litiasis.


3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura;

Las suturas no absorbibles están constituidas por material no biodegradable, por lo que no pueden ser digeridas por las enzimas ni hidrolizarse en los tejidos. En último término, los

MEDIBEL S.A.
PRESIDENTE
JORGE A. BELLAGAMBA
DNI 23050304

DIEGO ARIEL BOTTA
Biong. Mat. 5195
D.N.I. 17.705.247
DIRECTOR TÉCNICO

Marta Beatriz Alairón
Farmacéutica
M.N. 10324
Directora Técnica

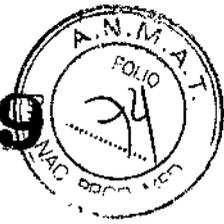

fibroblastos las encapsulan de manera permanente, por lo que mantienen su máxima resistencia en el tiempo, salvo en el caso de ser retirados los puntos en el postquirúrgico. (Sutura de piel). Existen distintos tipos de suturas no absorbibles con diversos niveles de resistencia pudiendo ser monofilares o multifilares que se seleccionarán dependiendo de los tejidos que se van a suturar o a criterio del profesional.

Características:

- Excelente resistencia a la tracción de forma prolongada
- Gran inercia química y biológica
- Gran suavidad de paso y deslizamiento a través de los tejidos.

3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos;

Modo de empleo:

Las suturas son utilizadas por profesionales técnicos que conocen los métodos quirúrgicos inherentes a su utilización.

El polipropileno Aragó tiene una fuerza tensil alta, fácil deslizamiento a través de los tejidos y de gran inercia química y biológica. Produce una reacción tisular mínima seguida de una encapsulación gradual del material de sutura por tejido fibroso. Está indicado para aplicar cuando el procedimiento quirúrgico requiera el uso de un material de sutura no absorbible. Es apropiado para la aproximación y/ o ligaduras de tejidos blandos en general: cirugía plástica, cardiovascular, reparación de nervios y aponeurosis, pared abdominal y oftalmología.

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización;

No reesterilizar

Compruebe la integridad del envase esterilizado antes de su uso. Si el envase está dañado, se debe descartar el producto de acuerdo a la reglamentación vigente de residuos peligrosos.


No vuelva a usar el dispositivo, ya que esto puede conducir a infección, enfermedad, lesión y muerte del paciente.

MEDIBEL S.A.
PRESIDENTE
JORGE A. BELLAGAMBA
DNI 23050362

DIEGO ARIEL BOTTA
Blong Mat. 5195
D.N.I. 17.705.247
DIRECTOR TÉCNICO

Marta Cecilia Alarcón
Farmacéutica
M.N. 10327
Directora Técnica

1569

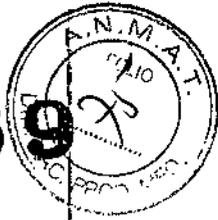

3.8. Desinfección/Limpieza/Esterilización

Advertencia

No Corresponde. El producto es de un solo uso

3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros)

- No usar si el embalaje está dañado.

3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras;

Condiciones ambientales

Conservar en un lugar fresco y seco entre 10 °C y 30 °C.

MEDIBEL S.A.
PRESIDENTE
JORGE A. BELLAGAMBA
DNI 23050304

DIEGO ARIEL BOTTA
Blong, Mat. 5195
D.N.I. 17.705.247
DIRECTOR TECNICO

Marta Beatriz Almirón
Farmacéutica
M.N. 10321
Directora Técnica



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-003252-16-2

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **1.569** y de acuerdo con lo solicitado por MEDIBEL S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE ESTERIL DE POLIPROPILENO

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: Nº 13-909, SUTURAS MONOFILARES DE POLIPROPILENO

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): ARAGÓ

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s: Cirugía general, cirugía plástica, cirugía cardiovascular, reparación de nervios, aponeurosis, pared abdominal, anastomosis vasculares y hernias.

Modelo/s: POLIPROPILENO ARAGÓ

Período de vida útil: 5 años

Forma de presentación: Cajas de 12, 25, 36, 40 y 50 unidades

E. A.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias


Nombre del fabricante: Laboratorio Aragón S.L

Lugar/es de elaboración: Calle Salvador Mundí, N° 11, 08017, Barcelona, España

Se extiende a MEDIBEL S.A. el Certificado de Autorización e Inscripción del PM-1208-51, en la Ciudad de Buenos Aires, a**14 FEB. 2017**....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N°

1569

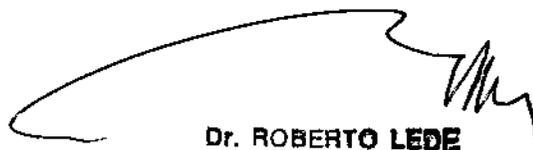

Dr. ROBERTO LEIDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.