"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



DISPOSICIÓN Nº 440 7

BUENOS AIRES, 27 JUL 2012

VISTO el Expediente Nº 1-47-20003-11-9 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Biomat Instrumental S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



DISPOSICIÓN Nº Z

4407

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso il) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA DISPONE:

ARTICULO 1º - Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca KOWA, nombre descriptivo Lámparas de Hendidura y nombre técnico Lámparas de Hendidura, de acuerdo a lo solicitado por Blomat Instrumental S.R.L. con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 50 y 20 a 31 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-1071-25, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por

....

Q,



DISPOSICIÓN Nº

4407

cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Registrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifiquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-20003-11-9

DISPOSICIÓN Nº

4407

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.R.M.A.T.



ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº4..4..0....7......

Nombre descriptivo: Lámparas de Hendidura.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 12-281 — Lámparas de Hendidura.

Marca del producto médico: KOWA.

Clase de Riesgo: Clase I.

Indicación/es autorizada/s: Biomicroscopía Oftálmica.

Modelo(s): SL-15.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias,

Nombre del fabricante: Kowa Company., Ltd. Hamamatsu Factory.

Lugar/es de elaboración: 3-1 Shin-Miyakoda, 1-chome, Kita-ku, Hamamatsu-Shi,

Shizuoka, Japón.

Expediente Nº 1-47-20003-11-9

DISPOSICIÓN Nº

4407

Dr. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR A.N.M.A.T.



ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

Dr. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR A.N.M.A.T.





MODELO DE ROTULO (ANEXO IHB Dispo. 2318/02)

LAMPARAS DE HENDIDURA KOWA SL-15

Producto Médico Importado por: BIOMAT INSTRUMENTAL SRL Concepción Arenal 3425 piso 2 depto 44 C.A.B.A.

Fabricado por:

Kowa Company., Ltd. Hamamatsu Factory

3-1 Shin- Miyakoda, 1-chome, Kita-ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka, Japón

NUMERO DE SERIE: xxx

Indicaciones, instrucciones de uso y advertencia se indican en el manual de instrucción.

Responsable Técnico: Amaldo Bucchianeri MN 13056 Farmacéutico

Autorizado por ANMAT PM-1071-25

"Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias"

Simbología: conservar entre -15° C y 60° C

RNALDO BUTCHANERI

BIOMAT INSTITUTIONAL S.R.L.

BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L.
FABIAN MONTELEONE
SOCIO GERENTE

SUMARIO DE MANUAL DE INSTRUCCIONES (ANEXO IIIB Dispo. 2318/02)

LAMPARAS DE HENDIDURA KOWA SL-15

Producto Médico Importado por: BIOMAT INSTRUMENTAL SRL.
Concepción Arenal 3425 piso 2 depto 44 C.A.B.A.

Fabricado por:


Kowa Company., Ltd. Hamamatsu Factory

3-1 Shin- Miyakoda, 1-chome, Kita-ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka, Japón

Responsable Técnico: Amaldo Bucchianen. Farmacéutico MN 13056

Autorizado por ANMAT PM-1071-25

"Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias"

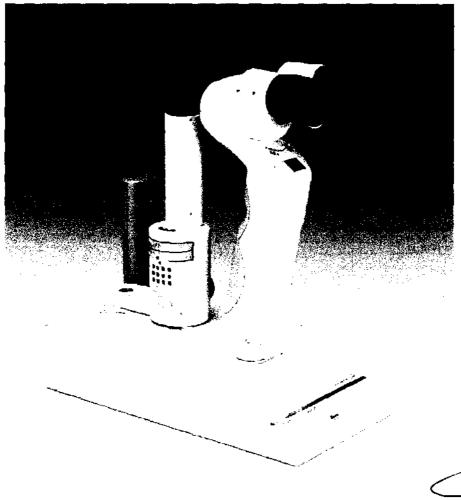


BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L. FABIAN MONTELEONE SOCIO GERENTE ARNYCOO BUCCHIANERI
FAMACEUTICO
M. N. 13.050
DIRECTOR TUCNICO

DIRECTION TOURISM RIGHAT INSTAURIGHTAL S.R.L.



1. Denominación y función de cada una de las partes

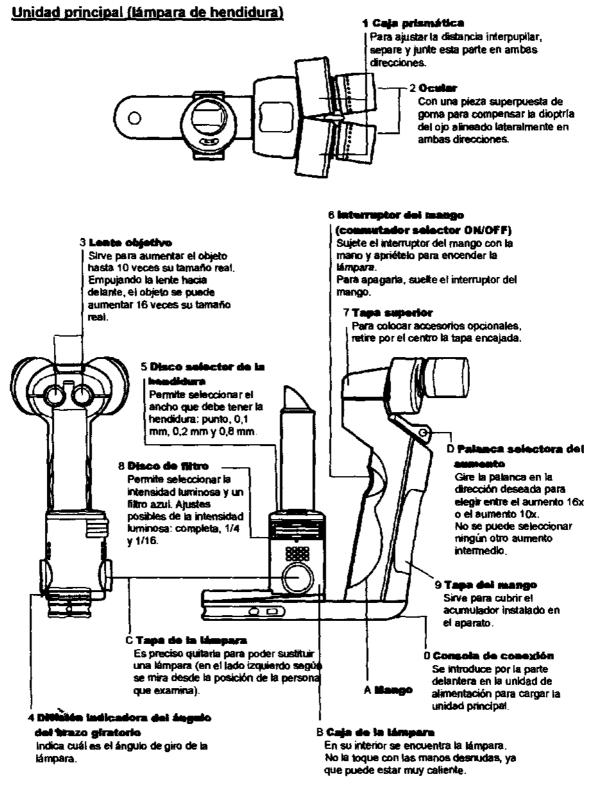

BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L. FABIAN MONTELEONE FABIAN SOCIO GERENTE ARNALDO ENCCHIANERI

FARMCEUTICO
M. 13,055


DIRECTOS TI, DINCO
BIOMAT INDIREMENIAL S.R.L.





1. Denominación y función de cada una de las partes

Alimentación eléctrica (cargador)

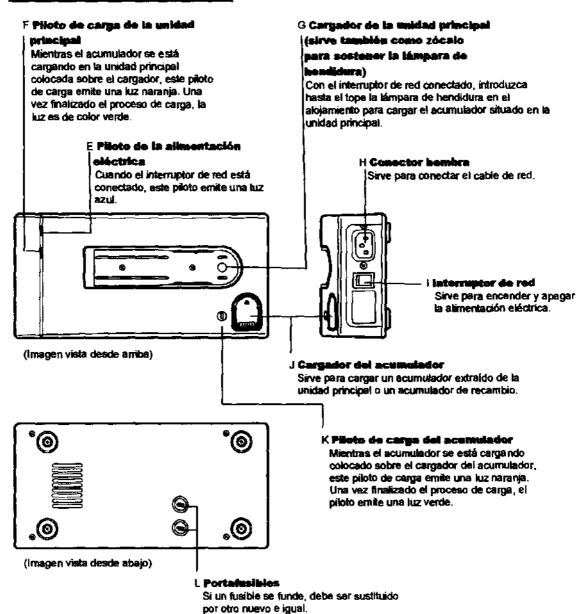

BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L. FABIAN MONTELEONE SOCIO GERENTE

ARNALDO SLOCHIANERI
FARMALEUTICO
M.N. 18056
OIRECTOR FECNICO
BIOMAT INSTRUMISHTAL S.R.L.


4407



1. Denominación y función de cada una de las partes

Acumulador


Tipo: SL-PP150 (Kowa Company, Ltd.)

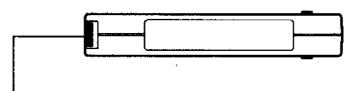

M Conector del acumulador

Al introducir el acumulador en la unidad principal o colocarlo sobre el cargador del acumulador, asegúrese de que sus conexiones hacen un buen contacto con el cargador.

Apoyo para la frente (opcional)

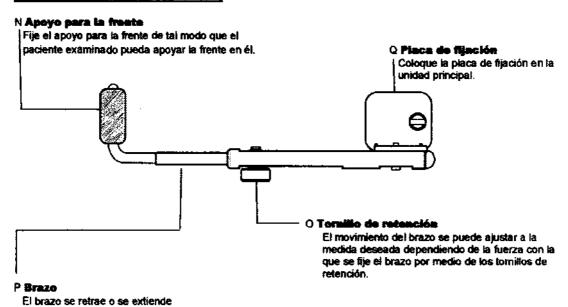

SIOMAY INSTRUMENTAL S.R.L.
FABIAN MONTELEONE
SOCIO GERENTE

dependiendo de la presión ejercida sobre el apoyo para la frente.

ARNAL DO BUCCHIANERI

ARNAL DO BUCCHIANERI

M. N. 13.055

M. N. 13.055

DIFECTOR TECNICO

BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L.





Indicaciones de seguridad

Medidas de precaución durante el servicio

Al emplazar o guardar el aparato, evite exponerio a altas temperaturas, humedad, radiación solar directa o
polvo. Las condiciones ambientales descritas más abajo se deben mantener obligatoriamente.

	Durante el servicio	Durante el transporte y almacenamiento
Temperatura ambiente	Entre 10° C y 40° C	Entre -15° C y 60° C
Humedad relativa	Entre 30 % y 75 %	Entre 10 % y 95 %

- Elija un lugar de emplazamiento en el que el aparato no se pueda desenchufar accidentalmente de la red
 eléctrica. Si, a pesar de todo, el aparato se llegara a desenchufar de la red, asegúrese de desconectar el
 interruptor de red antes de volver a enchufarto.
- Al utilizar, almacenar o transportar el aparato, evite que se condense rocio sobre él.

[Servicio]

- Al manejar el aparato, evite que sufra ningún golpe. Si el aparato se golpea, se cae o sufre algún daño, no
 conecte la alimentación eléctrica sin antes haber tomado medidas de seguridad.
- Con el fin de proteger el aparato, dejelo siempre cubierto cuando no lo vaya a utilizar.
- Encaje todos los interruptores y botones en su correspondiente posición de partida.
- No haga funcionar la témpara de manera continua. Como regla general: cuando la témpara lleve 2 minutos funcionando, desconéctela durante por lo menos 3 minutos.

[Alimentación eléctrica/carga]

- Para evitar posibles averías, cargue solamente el acumulador previsto para ello. Cualquier otro acumulador podría explotar y provocar lesiones o daños materiales.
- La tensión de entrada no debe rebasar ± 10 % del valor de tensión nominal.
- Evite conectar e immediatamente desconectar el interruptor de red. Deje que pasen por lo menos cinco segundos entre su conexión y su desconexión.
- El aparato debe estar apagado cuando lo enchufe o lo desenchufe.

[Medidas de precaución a la hora de desechar el aparato]

 A la hora de desechar este aparato, se deben cumptir las normas vigentes en los países o regiones en que se esté utilizando.

[Diferentes medidas de precaución]

- Kowa no será responsable de ningún fatlo o desperfecto causado por modificaciones, trabajos de mantenimiento o reparaciones que no hayan sido realizados por el servicio posventa.
- Kowa no será responsable de ningún fallo o desperfecto causado por modificaciones, trabajos de mantenimiento o reparaciones en los que no se hayan utilizado las piezas previstas (véase el certificado de garantía).
- Nunca desarme o ajuste el aparato por su cuenta. El aparato utiliza piezas de precisión cuyo ajuste requiere el uso de herramientas especiales.

BIOMAT INSTRUMENTAL S.K.L. FABIAN MONTELEONE SOCIO GERENTE

ARNALDO/BUCEMIANE
FARMACEURICO
LL.N. 13,056
DIRECTOR RECOVERY
BIOMAT INTERNACTION, S.R.L.



Medidas de precaución para mantener la seguridad y evitar accidentes al utilizar acumuladores

El acumulador de la Kowa SL-15 es un acumulador de iones de litio. Tome siempre las siguientes medidas de precaución para prevenir incendios y para evitar lesiones o quemaduras provocadas por la expulsión de líquido, el calentamiento, la inflamación o la explosión del aparato.

En caso de avería o expulsión de liquido:

- Retire inmediatamente el acumulador del foco del incendio. Si no lo hace, el fluido o gas expulsado puede inflamarse y explotar.
- Si penetra fiquido de la batería en el ojo, lave el ojo inmediatamente con agua limpia y haga que un médico lo examine.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o con la ropa, lave la parte manchada.

	⚠ Peligro		
Indicaciones de peligro	No arroje el acumulador al fuego ni lo cortocircuite o desarme. No lo caliente en un homo microondas o una cocine convencional. Para evitar posibles cortocircultos, no lleve encima el acumulador junto con objetos metálicos (por ejemplo monedas, horquillas o cadenas para el cuelto) ni tampoco lo guarde junto con este tipo de objetos.		
Indicaciones de peligro	No deje el acumutador (ni tampoco lo cargue) junto a una llama descubierta, bajo lo radisción directa del sol o dentro de un vehículo con una temperatura interior elevada.		
Indicaciones de peligro	Cargue el acumulador únicamente con el cargador previsto para tal fin. No cargue ningún otro acumulador diferente del previsto.		
Indicaciones de peligro	No utilice ni cargue el acumulador si está humedecido con algún liquido (agua potable, agua salada, leche, refrescos, lejia de jabón, elc.).		

	⚠ Advertencia		
Indicaciones de peligro	No deje el acumutador (ni tampoco lo cargue) junto a una tlama descublerta, bejo la radiación directa del sol o dentro de un vehiculo con una temperatura interior elevada, ya que el circuito protector que el acumutador tiena en su interior para evitar petignos podyía no funcionar.		
Indicaciones de peligro	No golpee el scumulador (por ejemplo con un martillo), no lo pise y no la deje caer.		
Indicaciones de peligito	No humedezca el acumulador con ningún tipo de líquido (como por ejemplo, agua potable, agua salada, refrescos o lejia de jabón).		

	A Precaución	
•	Tanto en el aperato como en el cargador, monte el acumulador en lo dirección correcta.	
Obligatorio		
	Sáquelo del aparato cuando está agotado y no lo yaya a utilizar durante un largo tiempo.	
Obligatorio		

Recomendaciones sobre cómo desechar el acumulador.

Un acumulador de iones de litio se puede reciclar.

Si ya no va a utilizar un acumulador, recomendamos que pegue cinta adhesiva sobre los contactos antes de devolvérselo a Kowa (o at representante de Kowa que se lo vendió) o antes de llevarlo al punto de recogida de materiales reciclables.



BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L. FABIAM MONTELEONE SOCIO GERENTE ARNACOO BLICCHIANERI
FARMACEUTICO
DIRECTOR STONICO
BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L.





Advertencia



Si se detectan olores o ruidos anormales, sobrecalentamiento o humo, el aparato se debe apagar y desenchular de la red de forma inmediata.

Si el aparato se sigue utilizando tras haber detectado alguna de estas anomalias, pueda producirse un incendio o un fallo de funcionamiento. En ese caso, deberá establecerse contacto con el representante de Kowa correspondiente o con el laller más próximo para que revisen el aparato.

Desenchufar de la red



Antes de cambiar un fusible, asegúrese de haber apagado y desenchufado el aparato. Si quita la tapa del portafusibles con el aparato enchufado a la red, puede sufrir una descarga eléctrica.



Obligatorio

Asequirese de que el conector de red o adaptador de red está correctamente encluríado a la toma de

De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.



Utilice solamente el fusible suministrado o un fusible adecuado para este fin. De lo contrario, el aparallo puede faller o se puede producir un incendio.

Obligatorio



Para garantizar la seguridad de su peciente, asegúrese de que el aparato está correctamente puesto a

Enchufe el conector de red solamente a una toma de corriente con puesta a tierra (toma de 2 polos con contacto de puesta a tierra).

De la contrario, puede sufrir una descarga eléctrica.

Obligatorio



El aparato na se debe emplazar cerca de un recipiente que contenga liquido. La penetración de liquido en el aparato pueda provocar una descarga eléctrica. Si penetra liquido, apague el aparato y desenchufe el cable de red de la tome de corriente. Póngase en contacto con su representante de Kowa o con el toller más cercano para que revisen el aparato.



No desarme, modifique ni repare por cuenta propia el aparato. De lo contrario, existe peligro de incendio, descarga eléctrica, fallos de funcionamiento en el aparato o fesiones. Póngese en contacto con su representante de Kowa o con el taller más cercano para que reperen el aperato. Cualquier producto armado por cuenta propia no estará cubierto por la garantia ni por ningún tipo de servicio posventa.

No desarma



En la toma de corriente o en la regieta de enchufes no se debe rebasar la capacidad de carga nominal. No conecte el cable de red principal junto con otros aparatos a la misma torna de corriente, ya que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Indicaciones de peligro



No introduzca ningún objeto metálico en las ranuras o aberturas de ventilación ya que puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o un fallo de funcionamiento.

Indicaciones de peligro



Proteía el cable de red contra posibles daños.

Un cable de red defiado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. El cable de red no se dehe modificar.

No coloque ningún objeto pesado sobre el cable de red y no tire de él. Mentenge el cable de red alejado del calor y evite que se sobreceliente.

Indicaciones de peligro



Utilice solamente la támpara suministrada o una támpara adecuada para este fin. De la contrario, puede producirse un fallo de funcionamiento a un incendio.

Obligatorio



No cortocircuite las conexiones del cargador de la unidad principal ni el acumulador. Mantenga los clips, les clavos y otros objetos metálicos alejados de las conexiones del cargador a fin de evitar un incendio o una descarga eléctrica.

Indicaciones de peligro

BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L FABIAN MONTELEONE SOCIO GERENTE

BUCCHIANERI **FARWACEUTICO**

00

M. N. 13,056 DIRECTOR FECSION BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L.



Precaución Para desconectar el aparato de la red, desenchifeto de la toma de corriente tirando del conector de red. Si no lo hace así, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. No enchufe el conector de red a la torna de comiente (ni lo desenchufe de ella) con las manos mojadas. Si to hace, puede sufrir una descarga eléctrica. Indicaciones de peligro El aparato no se debe emplazar en un lugar inestable, por ejemplo sobre una base tambaleante o cualquier otra superficie que pueda volcar. De lo contrario, existe el peligro de que el aparato vuelque o se caiga, provocando lesiones al usuario y/o a otras personas. Indicaciones de peligro No cambie la lámpara inmediatamente después de traber utilizado el aparato. De lo contrario, la alta temperatura puede provocarle quemaduras en los dedos. Antes de cambiar una B Califor támpara, deje que se enfrie durante aprox. 30 minutos. Indicaciones de peligro El ventilador no debe estar bioqueado. Si el ventilador está bioqueado, la temperatura puede aumentar en el interior del aparato y provocar fallos de funcionamiento en el aparato o incluso incendiarlo. Indicaciones de paligro Mientras esté utilizando el aparato, manténgato alejado de cualquier fuente de humedad, polvo, hollin o Si no lo hace asi, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Indicaciones de peligro No toque el aperato ni el acumulador con les manos húmedas. De lo contrario, puede sufrir una descarga eléctrica. Indicaciones de peligro Si no va a utilizar el aparato en mucho tiempo, desenchufe el cable de red de la toma de corriente y retire y guarde el acumulador. De lo contrario, puede producirse un incendio. Desenchufar de la red Monte el acumulador de forma correcta De lo contrario, puede caerse accidentalmente y provocarte lesiones. Indicaciones de peligro No toque la unidad de alimentación o el acumulador mientras se carga, ya que puede estar muy caliente. El contacto prolongado de la piel con el acumulador o con la unidad de alimentación puede provocar quemaduras aunque su temperatura sea relativamente baja Indicaciones de peligro No introduzca los dedos entre el brazo giralorio y la consola de conexión. Si lo hace, puede aplastarse o lesionarse los dedos. indicaciones de peligro No introduzca los dedos en el especio intermedio de la caja prismática. Si la hace, puede aphietarse o lesionarse los dedos al ajuetar la distuncia interpupilar. Indicaciones de peligro Sujete y afiance la unidad principal antes de utilizarla o moverta de sitio. De la contrario, el aparato puede caerse accidentalmente y provocarte lesignes. Indicaciones de peligro No deje la lámpara conectada mucho tiempo a fin de evitar que la caja de la lámpara se caliente y le ргочодие диеглафитав. Indicaciones de peligro Si utiliza el apoyo para la frente con tomillos de retención, apriete antes estos tomillos para evitar que se aflojen durante el uso. De la contrario, el apoyo para la frente puede resbalar accidentalmente hacia usted y provocarle lesiones.

BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L. FABIAN MONTELEONE SOCIO GERENTE

Indicaciones de peligro

ARNAL ARMACAUTICO
MINICIPAL MINICIPAL SELL
BIOMAT INSTRUMENTAL SELL



6. Mantenimiento y conservación


6-1 Inspección diaria

- Apague el aparato y cúbralo cuando no vaya a utilizario hasta otro día.
- Compruebe que la lente objetivo queda libre de potvo, suciedad, huellas y líquido lagrimal.
- Limpie la unidad principal, la alimentación eléctrica y el acumulador con un paño suave. Si la suciedad está
 muy incrustada, utilice un producto de limpieza diluido. A fin de evitar daños, deformaciones o
 desprendimientos de la pintura, no utilice sustancias químicas ni soluciones como, por ejemplo, dituyentes o
 benceno.
- Si no va a utilizar el aparato en mucho tiempo, desenchufe el cable de red de la toma de corriente y retire el acumulador

6-2 Sustitución de la lámpara

- 1. Antes de la sustitución, compruebe que la támpara se ha enfriado.
- 2. Antes de desmontar la lámpara, quite la tapa.
- 3. Vuelva a colocar la tapa después de instalar una támpara nueva.



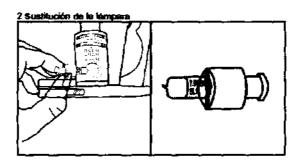

Caution -

Coloque firmemente la támpara en el portalámparas.

No toque la támpara con las manos desnudas. Si lo hace, la superficie de la támpara podría mancharse con la grasa de la piel. La superficie de la támpara, al calentarse, quemaria esta grasa y ello acortaría la vida útil de la támpara.

La lámpara solamente se puede utilizar con el modelo SL-15. Es incompatible con el modelo anterior (SL-14).

A Precaución

Utilice solemente la lámpara suministrada o una lámpara adecuada para este fin.

Si utiliza una lámpera distinta de la prevista, et aparato puede experimentar fallos de funcionamiento o incendiarse.

No cambie la lémpara inmedigitamente después de haberla utilizado.

Si lo hace, puede quemarse la mano, ya que la lámpera está muy caliente después de haber sido utilizada.


Antes de cambiar la lámpara, deje que se enfrie durante aprox. 30 minutos.

BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L. FABIAN MONTELEONE SOCIO GERENTE ARNALDO EMOCHIANERI
FARMACIUTICO
M. N. 13:056
PRIPEL OF TO MOD
BIOMAT ANTENNATIONAL S.R.L.



6-3 Sustitución del fusible

- 1. Con el aparato apagado, desenchufe el cable de red de la torna de corriente.
- Con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada, gire la tapa del portafusibles de la unidad de alimentación hasta retirarla y extraiga el fusible del portafusibles.
- Utilice obligatoriamente un fusible idéntico que tenga la capacidad correspondiente. A continuación, cambie el fusible por otro nuevo y vuelva a atomillar la tapa del portafusibles.

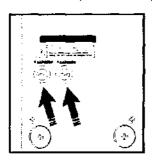

A Precaución

Antes de cambiar el fusible, desconecte el interruptor de red y desenchule el cable de red de la toma de corriente.

No quite la tapa del portafusibles con el aparato enchulado, si lo hace puede sufrir una descarga eléctrica.

Utilice solumente el fusible suministrado o un fusible adecuado para este fin. Si utiliza un fusible distinto del previsto, el aparato puede experimentar fallos de funcionamiento o incendiarse.

6-4 Inspección periódica

Se recomienda revisar el aparato cada dos años. Para más información sobre el tipo de revisión y el coste de la misma, consulte al representante de Kowa que le vendió la Kowa SL-15.

6-5 Reparación del aparato

Si necesita devolver la Kowa SL-15 al fabricante para fines de reparación o mantenimiento, rogamos que se ponga en contacto con uno de los representantes de Kowa mencionados al dorso de estas INSTRUCCIONES DE SERVICIO.

BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L. FABIAN MONTELEONE SOCIO GERENTE

ARNALDE BUCCHIANERI
ARNACEUTICO
M.N. 13.056
DIRECTOR TECNICO
BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L.



7. Datos técnicos

Unidad principal (lámpara de hendidura)

estereomicroscopio ortoscópico binocular Tipo:

Angulo interior: 13% Aumento: 10/16

Distancia de trabajo de la lente objetivo: Aproximadamente 80 mm (con el aumento 16x)

Aproximadamente 100 mm (con el aumento 10x)

Ø 10 mm (con el aumento 16x) Campo de visión útil: Ø 15 mm (con el aumento 10x)

oculares dobles Reticulo:

Tipo de aumento ajustable: 2 aumentos a elegir/tipo: lente objetivo móvif

Distancia interpupilar: 50 mm /70 mm Dioptria del ocular. -8 a +4 D

Tipo de hendidura: conmutación tipo torreta

Longitud de la hendidura: 12 mm filada Ancho de la hendidura: hendidura de 0,1 mm, 0,2 mm, 0,8 mm y punto de Ø12 mm

Ajuste de la intensidad luminosa: completa, 1/4, 1/16 (tres niveles).

± 60° en relación con su límite exterior horizontal Ángulo de iluminación de la hendidura;

filtro azul integrado Fillro:

Aproximadamente 40 minutos Tiempo de servicio ininterrumpido de la lámpara:

Tensión de entrada: 8,4 V de corriente continua (acumulador especial)

15 W Consumo de potencia:

Dimensiones/peso de la unidad principal: 221 mm (An)_106 mm (P)_214 mm (Al) / 790 gramos

Alimentación eléctrica (cargador)

Sirve también como zócalo para sostener la lámpara de Tipo:

hendidura. Conexión de salida: Para cargar un acumulador integrado y otro separado.

100 V - 240 V de corriente alterna a 50 Hz o 60 Hz Tensión de entrada: 90 VA

Alimentación eléctrica:

Tensión de salida: 8,4 V de corriente continua

Intensidad de corriente de salida: 1,5 A

Dimensiones/peso: 124 mm (An)_253 mm (P)_68 mm (Al) / 1250 gramos

BIOWAT INSTRUMENTAL S.R.L. FABIAN MONTELEONE SOCIO GERENTE

> FARMACEUTICO DIRECT ATTOMICO WHEN THE THE SIRE





Este apartado describe las medidas que se deben tomar si el aparato sufre alguna avería. Si el aparato sufre alguna avería, compruebe las siguientes posibilidades de fallo antes ponerse en contacto con el representante de Kowa que la vendió el aparato.

Antes de efectuar cualquier reperación, interrumpa obligatoriamente la alimentación eléctrica.

		- South Mill (Sept. 2015) - Sept. Se
	Commence of the Commence of th	
Después de agarrar el	Acumulador suelto	Fijar el acumulador
interruptor del mango con la mano, la lámpara no se enciende	Acumulador completamente vacío	Cargar et acumulador
	Disco de filtro mal ajustado (no señala la marca en forma de punto)	Alinear el disco de filtro con la marca en forma de punto
	Disco selector de la hendidura mal ajustado (no señala la marca en forma de punto)	Alinear el disco selector de la hendidura con la marca en forma de punto
	Lámpara fundida	Cambie la lámpara por otra Inueva
La lámpara no se puede encender o no/nunca se ilumina	¿El acumulador se ha cargado del todo?	Cargar el acumulador
(El acumulador se agota después de poco tiempo)	La potencia del acumulador ha disminuido (daños)	Al repetirse et ciclo de carga/descarga, la potencia del acumulador disminuye cada vez más
La hendidura se inclina	Disco selector de la hendidura mal ajustado (no señala la marca en forma de punto)	Alinear el disco selector de la hendidura con la marca en forma de punto
La lámpara/luz está parcialmente oscurecida	Disco de filtro mal ajustado (no señala la marca en forma de punto)	Alinear el disco de filtro con la marca en forma de punto
Visión desenfocada	Ajuste incorrecto de las dioptrías del ocular	Corregir el ajuste de las dioptrías del ocular
Al encender el aparato, el LED no se ilumina	Cable de red no conectado	Conectar correctamente el cable de red
Aunque la unidad principal está montada, el LED de carga no se ilumina	Unid ad princi pal mal introducida	Introducir la unidad principal con la suficiente profundidad
	No hay ningún acumulador montado en la unidad principal	Montar el acumulador en la unidad principal
Aunque el acumulador está introducido en el cargador del acumulador, el LED no se ilumina	Acumulador introducido al revés	Antes de introducir el acumulador, comprobar cuál de sus lados debe mirar hacia amba

BIOMAZINSTRUMENTAL S.R.L. FABIAN MONTELEONE FABIAN MONTELEONE

ARNAL DO BUCCHIANERI
FIRMACEUTICO
M.N. 13.050
DIRECTON TECHNOO
RIGMAT INSTRUMENTAL S.R.L.



ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente No: 1-47-20003-11-9

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº ...4...0....7, y de acuerdo a lo solicitado por Biomat Instrumental S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Lámparas de Hendidura.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 12-281 – Lámparas de Hendidura.

Marca del producto médico: KOWA.

Clase de Riesgo: Clase I.

Indicación/es autorizada/s: Biomicroscopía Oftálmica.

Modelo(s): SL-15.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: Kowa Company., Ltd. Hamamatsu Factory.

Lugar/es de elaboración: 3-1 Shin-Miyakoda, 1-chome, Kita-ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka, Japón.

DISPOSICIÓN Nº

4407

Dr. OTTO A. DASINGHEE SUB-INTERVENTOR A.D.M.A.T