



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº

7 6 6 9

BUENOS AIRES, 1 8 JUL 2016

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-4607-15-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones CENTRO SBZ S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y Decreto Nº 101 del 16 de diciembre de 2015.

E. A.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

DISPOSICIÓN Nº

7 6 6 9

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca ANTHOGYR, nombre descriptivo PERNOS DE ACERO INOXIDABLE Y TITANIUM y nombre técnico Postes para el canal de la raíz, de acuerdo con lo solicitado por CENTRO SBZ S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 81 y 82 a 88 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-1257-56, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscribábase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entradas, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **7 6 6 9**

de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, Rótulos e Instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-3110-4607-15-4

DISPOSICIÓN Nº

gsch

7 6 6 9

Dr. ROBERTO LMB
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.




7 6 6 9


1 8 JUL 2016



PROYECTO DE ROTULO

1. Fabricado por: Anthogyr S.A.S., 2237 avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, Francia.
2. Importado por CENTRO SBZ S.A – Obispo Trejo 29, EP – Provincia de Córdoba – Argentina.
3. Producto para uso dental solamente.
4. Pernos de Titanium y Acero Inoxidable, Marca: Anthogyr.
Modelos: xxx
5. Fecha de fabricación:
6. Fecha de Vencimiento:
7. Lote nº:
8. Ver instrucciones de uso en el interior del envase.
9. Ver Precauciones, Advertencias y Contraindicaciones en Instrucciones de uso.
10. Director técnico: Carolina Silvia Kestler, Bioingeniera, MN 27744249
11. Autorizado por la ANMAT – PM-1257-56.
12. Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias.


CENTRO SBZ s.a.
JORGE O. SIBONA
PRESIDENTE


CAROLINA S. KESTLER
BIOINGENIERA
M.P. 27744249

7 6 6 9



PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

1. Fabricado por: Anthogyr S.A.S., 2237 avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, Francia.
2. Importado por CENTRO SBZ S.A – Obispo Trejo 29, EP – Provincia de Córdoba – Argentina.
3. Producto para uso dental solamente.
4. Pernos de Titanium y Acero Inoxidable, Marca: Anthogyr.
Modelos: xxx
5. Ver instrucciones de uso en el interior del envase.
6. Ver Precauciones, Advertencias y Contraindicaciones en Instrucciones de uso.
7. Director técnico: Carolina Silvia Kestler, Bioingeniera, MN 27744249
8. Autorizado por la ANMAT – PM-1257-56.
9. Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias.

Protocolo de Colocación:

Elección del perno

- 1-Coloque el film de calibración en la radiografía periapical.
- 2-El film de calibración es a gran escala, asegúrese de revisar la escala de la radiografía.
- 3-Seleccione el producto de obturación más adecuado para el caso (longitud de diámetro).


Higiene

Todos los dispositivos médicos intra-orales, deben ser limpiados, desinfectados y esterilizados.

Preparación del canal

- Utilice el taladro Gates para eliminar la gutapercha que queda en el canal.
- Progresivamente ensanchar el canal mediante el uso de taladros de diámetro creciente. El último taladro utilizado, debe ser del mismo tamaño que el dispositivo a ser colocado.
 - Asegúrese que quede suficiente pared de la dentina.
 - Utilice los topes y calibre para ajustar la profundidad de fresado. Los topes se fijan en el taladro y proporcionan una indicación visual de la profundidad a perforar.


CENTRO SBZ s.a.
JORGE O. SIBONA
PRESIDENTE


CAROLINA S. KESTLER
BIOINGENIERA
N.P. 27744249



7 6 6 9



- Compruebe que los códigos de color, tanto para los accesorios (taladros / escariadores o claves) y los dispositivos médicos son los mismos.
- Si es necesario, crear una base para la cabeza utilizando un Aveflanador que coincida con el diámetro del dispositivo médico para ser acopladas (mismo código de color que el taladro / escariador o el dispositivo médico).

Colocación del perno

- Compruebe la integridad física del perno (defectos de fabricación, signos de impacto, corrosión) antes de colocar en la boca.
- Montar el perno en la boca.
- Aplique el cemento de sellado.
- Utilice una llave para fijar el dispositivo médico en su lugar en el interior del canal. Utilice una llave hueca o, si no hay suficiente espacio, una llave de cruz. Utilice el orificio de la llave y el hilo dental para hacer un sistema de salvaguardia, de manera que el dispositivo médico no puede perderse dentro de la boca.


Advertencias

- Estos elementos deben utilizarse por profesionales que hayan recibido una formación teórica y práctica apropiada. La práctica de colocación debe realizarse en lugares acordes como consultorios dentales.

Precauciones:

- Antes de proceder a la inserción del perno debe realizarse una perfecta medición del conducto fresado, así como la comprobación de la ubicación del producto, utilizando el calibre de profundidad.
- Comprobar el código de colores del perno y de las herramientas, para corroborar que se está utilizando el kit adecuado.
- Los pernos deben inspeccionarse cuidadosamente a fin de asegurar la integridad y la perfecta conservación de su forma original.


CENTRO SBZ s.a.
JORGE O. SIBONA
PRESIDENTE


CAROLINA S. KESTLER
BIOINGENIERA
M.P. 27744249





Esterilización

Limpie todos los postes en un limpiador ultrasónico durante 5 minutos. Retire y enjuague bien con agua de la canilla; seque con toalla de papel. Coloque el poste o postes en un pequeño recipiente de vidrio tapado y limpio. Añada una solución esterilizantes de liquido transparente autorizada por la FDA que contenga un 7.50% de peróxido de hidrogeno y 0.85% de acido fosfórico.

Deje reposar a temperatura ambiente durante un mínimo de 6 horas pero sin superar las 24hs. Vierta la solución a la pileta y añada agua estéril al recipiente de vidrio que cubre los postes. Agite suavemente la solución durante dos minutos, y después vierta la solución en la pileta y deposite el poste o postes en una esponja estéril, en un recipiente limpio. Ponga la tapa y guarde hasta que esté listo para el uso.

Almacenaje


Evite el contacto directo con la luz solar. Temperatura Ambiente.


Formas de presentación

1 unidad según corresponda.

Modelos;

5300C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5300M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5300V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5301C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5301M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5301V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5302C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5302M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5302V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5305C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5305M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000


CENTRO SBZ s.a.
JORGE O. SIBONA
PRESIDENTE



CAROLINA S. KESTLER
BIOINGENIERA
M.P. 27744249




7 6 6 9



5305V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5306C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5306M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5306V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5307C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5307M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5307V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5310C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5310M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5310V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5311C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5311M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5311V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5312C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5312M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5312V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5315C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5315M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5315V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5316C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5316M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5316V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5317C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5317M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5317V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5320LD	Set Completo Pernos Acero Inoxid.


CENTRO SBZ s.a.
JORGE O. SIBONA
PRESIDENTE


GAROLINDA S. KESTLER
BIOINGENIERA
M.P. 27744249



7 6 6 9



5320WD	Set Pernos Acero Inoxid.
5324C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5324M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5324V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5325C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5325M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5325V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
5326C	Perno Acero Inoxid. Caja x 100
5326M	Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
5326V	Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20
7782RF	Perno Poste de Titanium Set
7800R	Perno Poste R de Titanium
7800RC	Perno Poste R de Titanium Caja x 100
7800RM	Perno Poste R de Titanium Caja x 1000
7800RV	Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20
7801R	Perno Poste R de Titanium
7801RC	Perno Poste R de Titanium Caja x 100
7801RM	Perno Poste R de Titanium Caja x 1000
7801RV	Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20
7802R	Perno Poste R de Titanium
7802RC	Perno Poste R de Titanium Caja x 100
7802RM	Perno Poste R de Titanium Caja x 1000
7802RV	Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20

E

CENTRO SBZ s.a.
JORGE O. SIBONA
PRESIDENTE

CAROLINA S. KESTLER
BIOINGENIERA
M.P. 27744249

7 6 6 9



7805R	Perno Poste R de Titanium
7805RC	Perno Poste R de Titanium Caja x 100
7805RM	Perno Poste R de Titanium Caja x 1000
7805RV	Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20
7806R	Perno Poste R de Titanium
7806RC	Perno Poste R de Titanium Caja x 100
7806RM	Perno Poste R de Titanium Caja x 1000
7806RV	Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20
7807R	Perno Poste R de Titanium
7807RC	Perno Poste R de Titanium Caja x 100
7807RM	Perno Poste R de Titanium Caja x 1000
7807RV	Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20
7810R	Perno Poste R de Titanium
7810RC	Perno Poste R de Titanium Caja x 100
7810RM	Perno Poste R de Titanium Caja x 1000
7810RV	Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20
7811R	Perno Poste R de Titanium
7811RC	Perno Poste R de Titanium Caja x 100
7811RM	Perno Poste R de Titanium Caja x 1000
7811RV	Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20

E

CENTRO SBZ s.a.
JORGE O. SIBONA
PRESIDENTE

CAROLINA S. KESTLER
BIOINGENIERA
M.P. 27744249




7812R	Perno Poste R de Titanium
7812RC	Perno Poste R de Titanium Caja x 100
7812RM	Perno Poste R de Titanium Caja x 1000
7812RV	Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20
7815R	Perno Poste R de Titanium
7815RC	Perno Poste R de Titanium Caja x 100
7815RM	Perno Poste R de Titanium Caja x 1000
7815RV	Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20
7816R	Perno Poste R de Titanium
7816RC	Perno Poste R de Titanium Caja x 100
7816RM	Perno Poste R de Titanium Caja x 1000
7816RV	Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20
7817R	Perno Poste R de Titanium
7817RC	Perno Poste R de Titanium Caja x 100
7817RM	Perno Poste R de Titanium Caja x 1000
7817RV	Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20

Vida útil
5 años.

E


CENTRO SBZ S.A.
JORGE O. SIBONA
PRESIDENTE


CAROLINA S. KESTLER
BIOINGENERA
M.P. 27744249

CS



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-4607-15-4

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **7669**, y de acuerdo con lo solicitado por CENTRO SBZ S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: PERNOS DE ACERO INOXIDABLE Y TITANIUM.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-202 - Postes para el canal de la raíz.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): ANTHOGYR.

Clase de Riesgo: II.

Indicación/es autorizada/s: Sistema de anclaje intrarradicular para sostener la restauración dental.

Modelo/s: 5300C Perno Acero Inoxid.

5300M Perno Acero Inoxid.

5300V Perno Acero Inoxid.

5301C Perno Acero Inoxid.

5301M. Perno Acero Inoxid.

5301V Perno Acero Inoxid.

5302C. Perno Acero Inoxid.

5302M Perno Acero Inoxid.

5302V. Perno Acero Inoxid.

5305C Perno Acero Inoxid.

5305M Perno Acero Inoxid.

5305V Perno Acero Inoxid.

5306C Perno Acero Inoxid.

5306M Perno Acero Inoxid.

5306V Perno Acero Inoxid.

5307C Perno Acero Inoxid.

5307M Perno Acero Inoxid.

5307V Perno Acero Inoxid.

5310C Perno Acero Inoxid.

5310M Perno Acero Inoxid.

5310V Perno Acero Inoxid.

5311C Perno Acero Inoxid.

5311M Perno Acero Inoxid.

5311V Perno Acero Inoxid.

5312C Perno Acero Inoxid.

5312M Perno Acero Inoxid.

5312V Perno Acero Inoxid.

5315C Perno Acero Inoxid.

5315M Perno Acero Inoxid.

5315V Perno Acero Inoxid.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 5316C Perno Acero Inoxid.
- 5316M Perno Acero Inoxid.
- 5316V Perno Acero Inoxid.
- 5317C Perno Acero Inoxid.
- 5317M Perno Acero Inoxid.
- 5317V Perno Acero Inoxid.
- 5320LD Set Completo Pernos Acero Inoxid.
- 5320WD Set Pernos Acero Inoxid.
- 5324C Perno Acero Inoxid.
- 5324M Perno Acero Inoxid.
- 5324V Perno Acero Inoxid.
- 5325C Perno Acero Inoxid.
- 5325M Perno Acero Inoxid.
- 5325V Perno Acero Inoxid.
- 5326C Perno Acero Inoxid.
- 5326M Perno Acero Inoxid.
- 5326V Perno Acero Inoxid.
- 7782RF Perno Poste de Titanium Set.
- 7800R Perno Poste R de Titanium.
- 7800RC Perno Poste R de Titanium.
- 7800RM Perno Poste R de Titanium.
- 7800RV Perno Poste R de Titanium.
- 7801R Perno Poste R de Titanium.

7801RC Perno Poste R de Titanium.

7801RM Perno Poste R de Titanium.

7801RV Perno Poste R de Titanium.

7802R Perno Poste R de Titanium.

7802RC Perno Poste R de Titanium.

7802RM Perno Poste R de Titanium.

7802RV Perno Poste R de Titanium.

7805R Perno Poste R de Titanium.

7805RC Perno Poste R de Titanium.

7805RM Perno Poste R de Titanium.

7805RV Perno Poste R de Titanium.

7806R Perno Poste R de Titanium.

7806RC Perno Poste R de Titanium.

7806RM Perno Poste R de Titanium.

7806RV Perno Poste R de Titanium.

7807R Perno Poste R de Titanium.

7807RC Perno Poste R de Titanium.

7807RM Perno Poste R de Titanium.

7807RV Perno Poste R de Titanium.

7810R Perno Poste R de Titanium.

7810RC Perno Poste R de Titanium.

7810RM Perno Poste R de Titanium.

7810RV Perno Poste R de Titanium.

E 1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

7811R Perno Poste R de Titanium.

• 7811RC Perno Poste R de Titanium.

7811RM Perno Poste R de Titanium.

7811RV Perno Poste R de Titanium.

7812R Perno Poste R de Titanium.

7812RC Perno Poste R de Titanium.

7812RM Perno Poste R de Titanium.

7812RV Perno Poste R de Titanium.

7815R Perno Poste R de Titanium.

7815RC Perno Poste R de Titanium.

7815RM Perno Poste R de Titanium.

7815RV Perno Poste R de Titanium.

7816R Perno Poste R de Titanium.

7816RC Perno Poste R de Titanium.

7816RM Perno Poste R de Titanium.

7816RV Perno Poste R de Titanium.

7817R Perno Poste R de Titanium.

7817RC Perno Poste R de Titanium.

7817RM Perno Poste R de Titanium.

7817RV Perno Poste R de Titanium.

Período de vida útil: 5 años.

Forma de presentación: 5300C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.

5300M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000.

CA

5300V Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20.
5301C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.
5301M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000.
5301V Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20.
5302C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.
5302M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000.
5302V Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20.
5305C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.
5305M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000.
5305V Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20.
5306C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.
5306M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000.
5306V Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20.
5307C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.
5307M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000.
5307V Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20.
5310C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.
5310M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000.
5310V Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20.
5311C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.
5311M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000.
5311V Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20.
5312C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.

E. A.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 5312M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000
- 5312V Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20.
- 5315C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.
- 5315M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000.
- 5315V Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20.
- 5316C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.
- 5316M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000.
- 5315317C. Perno Acero Inoxid Caja x 100.
- 5317M Perno Acero Inoxid Caja x 1000.
- 5317V Perno Acero Inoxid Bolsa x 20.
- 5320LD Set Completo Pernos Acero Inoxid.
- 5320WD. Set Pernos Acero Inoxid.
- 5324C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.
- 5324M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000.
- 5324V Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20.
- 5325C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.
- 5325M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000.
- 5325V Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20.
- 5326C Perno Acero Inoxid. Caja x 100.
- 5326M Perno Acero Inoxid. Caja x 1000.
- 5326V Perno Acero Inoxid. Bolsa x 20.
- 7782RF Perno Poste de Titanium Set.
- 7800R Perno Poste R de Titanium.

E. A.

7800RC Perno Poste R de Titanium Caja x 100.
7800RM. Perno Poste R de Titanium Caja x 1000.
7800RV Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20.
7801R Perno Poste R de Titanium.
7801RC Perno Poste R de Titanium Caja x 100.
7801RM. Perno Poste R de Titanium Caja x 1000.
7801RV Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20.
7802R Perno Poste R de Titanium.
7802RC Perno Poste R de Titanium Caja x 100.
7802RM. Perno Poste R de Titanium Caja x 1000.
7802RV Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20.
7805R Perno Poste R de Titanium.
7805RC Perno Poste R de Titanium Caja x 100.
7805RM. Perno Poste R de Titanium Caja x 1000.
7805RV Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20.
7806R Perno Poste R de Titanium.
7806RC Perno Poste R de Titanium Caja x 100.
7806RM. Perno Poste R de Titanium Caja x 1000.
7806RV Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20.
7807R Perno Poste R de Titanium.
7807RC Perno Poste R de Titanium Caja x 100.
7807RM. Perno Poste R de Titanium Caja x 1000.
7807RV Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20.

E 1



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

- 7810R Perno Poste R de Titanium.
- 7810RC Perno Poste R de Titanium Caja x 100.
- 7810RM. Perno Poste R de Titanium Caja x 1000.
- 7810RV Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20.
- 7811R Perno Poste R de Titanium.
- 7811RC Perno Poste R de Titanium Caja x 100.
- 7811RM. Perno Poste R de Titanium Caja x 1000.
- 7811RV Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20.
- 7812R Perno Poste R de Titanium.
- 7812RC Perno Poste R de Titanium Caja x 100.
- 7812RM. Perno Poste R de Titanium Caja x 1000.
- 7812RV Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20.
- 7815R Perno Poste R de Titanium.
- 7815RC Perno Poste R de Titanium Caja x 100.
- 7815RM. Perno Poste R de Titanium Caja x 1000.
- 7815RV Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20.
- 7816R Perno Poste R de Titanium.
- 7816RC Perno Poste R de Titanium Caja x 100.
- 7816RM. Perno Poste R de Titanium Caja x 1000.
- 7816RV Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20.
- 7817R Perno Poste R de Titanium.
- 7817RC Perno Poste R de Titanium Caja x 100.
- 7817RM. Perno Poste R de Titanium Caja x 1000.

E A

7817RV Perno Poste R de Titanium Bolsa x 20.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.


Nombre del Fabricante: ANTHOGYR S.A.S.

Lugar/es de elaboración: 2237 avenue André Lasquin, 74700 SALLANCHES,
Francia.

Se extiende a CENTRO SBZ S.A. el Certificado de Autorización e Inscripción del
PM-1257-56, en la Ciudad de Buenos Aires, a¹⁸ JUL 2016., siendo su
vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N°

E. 7 6 6 9


Dr. ROBERTO LEDO
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.