



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN Nº

8 23 7

BUENOS AIRES, 27 JUL 2016

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-188-16-3 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma G & G AUDIOLOGÍA S.R.L. solicita la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1517-11, denominado: AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PROGRAMABLES, marca ELECTONE-REXTON.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT Nº 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y Decreto Nº 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1517-11, denominado: AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PROGRAMABLES, marca ELECTONE-REXTON.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN Nº

8 2 3 7

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1517-11.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición y conjuntamente con su Anexo, Rótulos e Instrucciones de uso autorizados; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-3110-188-16-3

DISPOSICIÓN Nº

GI

8 2 3 7


DR. ROBERTO LEIDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **8237**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1517-11 y de acuerdo a lo solicitado por la firma G & G AUDIOLOGÍA ARGENTINA S.R.L., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico del producto médico: **AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PROGRAMABLES**, marca **ELECTONE-REXTON**.

Disposición Autorizante de RPPTM: N° 1370/09.

Tramitado por expediente N° 1-47-13834/08-7.

Datos a modificar:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Nombre del Fabricante	Fab 1: Siemens Audiologische Technik GmbH Fab 2: Siemens Medical Instruments Pte. Ltd.	Fab 1: Sivantos GmbH Fab 2: Sivantos Pte. Ltd.
Lugar de Elaboración	Fab 1: Gebbertstraße 125 D-91058 Erlangen, Alemania Fab 2: Blk Ayer Rajah Crescent Singapur 139959 Singapur	Fab 1: Henri-Dunant-Str. 100, 91058, Erlangen, Alemania Fab 2: Blk 28, Ayer Rajah Crescent #06-08, Singapur, 139959, Singapur
Marca	Electone	Electone Rexton
Modelos	Electone FIGARO 4 P TANGO: PRO P BTE-PRO S BTE-PRO SP	Electone FIGARO 4 P TANGO PRO P TANGO PRO S



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

	FIGARO 8 P FIGARO 4 SP	TANGO PRO SP FIGARO 4 SP Rexton FINESSE 18 2C P FINESSE 18 2C M ACCORD 16 2C M ACCORD 16 2C P ACCORD 12 2C M ACCORD 12 2C P ACCORD 12 2C HP JOY 8 2C M JOY 8 2C P JOY 6 2C M JOY 6 2C P TARGA PLUS FREE TARGA PLUS P TARGA PLUS HP TARGA S TARGA P TARGA HP	
Rótulos	Aprobado por Disposición ANMAT N° 5372/15	A fs. 8	
Instrucciones de Uso	Aprobado por Disposición ANMAT N° 5372/15	A fs. 9 a 18	

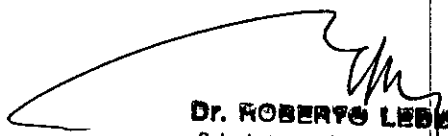
El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma G & G AUDIOLOGÍA ARGENTINA S.R.L., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1517-11, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días.....**27 JUL 2016**

Expediente N° 1-47-3110-188-16-3

DISPOSICIÓN N°

8 2 3 7


Dr. ROBERTO LEDESMA
 Subadministrador Nacional
 A.N.M.A.T.

AUDISER

G&G Audiología Argentina S.R.L.

-Lavalle 1675 | 5° | Of. 7 | C1048AAM | Buenos Aires | Argentina
Tel./Fax: (5411) 4372-2930 | (5411) 4371-3766
consulta@audiser.com.ar | www.audiser.com.ar

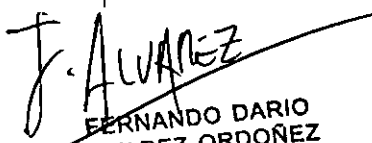
8 2 3



27 JUL 2016

PROYECTO DE ROTULO

1. Fabricado por:
 - Sivantos GmbH - Henri Dunant Str. 100 91058 Erlangen - Alemania
 - Sivantos Pte. Ltd. - Blk 28, Ayer Rajah Crescent #06-08 Singapur 139959, Singapur
2. Importado por G & G AUDIOLOGIA ARGENTINA SRL – Lavalle 1675 5º piso of. "7" – Capital Federal
3. Audífonos Digitales Retro Auriculares Programables, Marca: ELECTONE / REXTON Modelos: XXX
4. Serie Nº
5. Fecha de vto.:
6. Forma de presentación: 1 unidad.
7. Ver precauciones, Advertencias y Contraindicaciones en Manual del Usuario
8. Ver Instrucciones de uso en Manual del usuario
9. Conservar en lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor, dentro de su estuche original.
10. Director técnico: MARÍA LORENA CAPPELLI – FONOAUDIÓLOGA – MN 7741
11. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-1517-11
12. Venta bajo receta.


FERNANDO DARIO
ALVAREZ ORDOÑEZ
G & G AUDIOLOGIA ARGENTINA S.R.L.
GERENTE GENERAL

39


Lic. MARÍA LORENA CAPPELLI
FONOAUDIÓLOGA - UBA
M.N. 7741

8 2 3 7



AUDISER

G&G Audiología Argentina S.R.L.

Lavalle 1675 | 5° | Of. 7 | C1048AAM | Buenos Aires | Argentina
 Tel./Fax: (5411) 4372-2930 | (5411) 4371-3766
 consulta@audiser.com.ar | www.audiser.com.ar

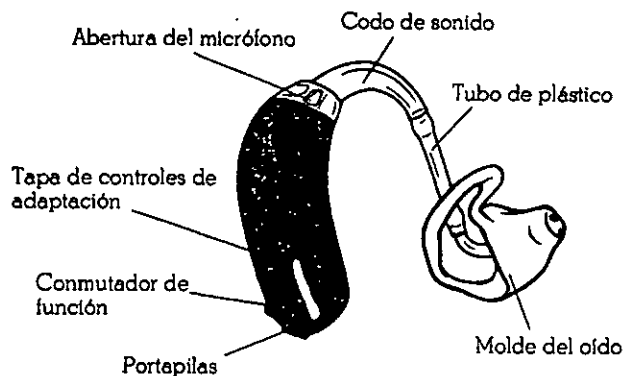
PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

1. Fabricado por:
 - Sivantos GmbH - Henri Dunant Str. 100 91058 Erlangen - Alemania
 - Sivantos Pte. Ltd. - Blk 28, Ayer Rajah Crescent #06-08 Singapur 139959, Singapur
2. Importado por G & G AUDIOLOGIA ARGENTINA SRL – Lavalle 1675 5º piso of. "7" – Capital Federal
3. Audífonos Digitales Retro Auriculares Programables, Marca: ELECTONE / REXTON Modelos: XXX
4. Conservar en lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor, dentro de su estuche original.
5. Director técnico: MARÍA LORENA CAPPELLI – FONOAUDIÓLOGA – MN 7741
6. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-1517-11
7. Venta bajo receta

Conociendo de su audífono

El dispositivo para usar detrás de la oreja esta diseñado para brindarle comodidad, buen desempeño y durabilidad. El dispositivo se coloca detrás de la oreja y se conecta a un molde auditivo adaptado.

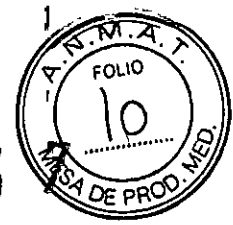
Su proveedor de cuidado auditivo le indicara donde encontrar el numero de serie de su modelo específico.



J. ALVAREZ

FERNANDO DARIO
 ALVAREZ ORDOÑEZ
 G & G AUDIOLOGIA ARGENTINA S.R.L.
 GERENTE GENERAL

M. LORENA CAPPELLI
 Lic. MARÍA LORENA CAPPELLI
 FONOAUDIÓLOGA - UBA
 M.N. 7741



8 2 3

AUDISER

G&G Audiología Argentina S.R.L.

Lavalle 1675 | 5° | Of. 7 | C1048AAM | Buenos Aires | Argentina
Tel./Fax: (5411) 4372-2930 | (5411) 4371-3766
consulta@audiser.com.ar | www.audiser.com.ar

su audioprotesista programó los audífonos con determinadas funciones de sonido con un programador controlado por un microprocesador o una computadora. Estas funciones están diseñadas para adaptar mejor el dispositivo auditivo a sus necesidades de audición individuales y ofrecerle amplificación nítida de alta calidad. Si es necesario, su audioprotesista puede regularlas o programarlas nuevamente.

Solo él puede reprogramar su audífono. Usted no puede regular otros controles salvo los opcionales mencionados a continuación:

- 7. Control de volumen manual
- 8. Interruptor teleespiral
- 9. Interruptor de selección de memoria

Según sus requisitos de adaptación individuales, se audioprotesista determinará si incluye alguno de estos controles.

Uso del interruptor de selección de memoria opcional

Si cuentan con un interruptor de selección de memoria, los dispositivos auditivos programables tienen múltiples memorias seleccionables.

Estas memorias almacenan definiciones preprogramadas que puede elegir en cualquier momento según sus requisitos auditivos.

Un pulsador en la placa frontal del dispositivo auditivo controla esta característica. Cada vez que pulsa el interruptor se selecciona la memoria siguiente. Así puede pasar fácilmente por cada una de las diferentes respuestas según sea necesario.

Los dispositivos para usar detrás de la oreja utilizan un botón o un interruptor para acceder a las opciones de memoria. El dispositivo auditivo programable emitirá una señal sonora cada vez que se cambia la memoria.


FERNANDO DARIÓ
ALVAREZ ORDOÑEZ
G & G AUDIOLÓGIA ARGENTINA S.R.L.
GERENTE GENERAL


Lic. MARÍA LORENA CAPPELLI
FONO/AUDIÓLOGA - UBA
M.N. 7741



AUDISER

G&G Audiología Argentina S.R.L.

Lavalle 1675 | 5° | Of. 7 | C1048AAM | Buenos Aires | Argentina
Tel./Fax: (5411) 4372-2930 | (5411) 4371-3766
consulta@audiser.com.ar | www.audiser.com.ar

Sustitución de la batería

Las baterías gastadas deben retirarse inmediatamente.

- Abra completamente la tapa de la batería llevando la lengüeta hacia fuera. Quite la lengüeta de papel de la parte posterior de una batería de las dimensiones apropiadas.
- Introduzca la pila nueva de tamaño 13 o 675 de forma que el signo "+" de la pila coincida con el signo grabado en el interior del portapilas.
- Cierre el compartimiento para la batería. No la fuerce. Si el compartimiento de la batería del audífono no tiene un signo "+", coloque la batería de las dimensiones correctas y cierre el compartimiento con suavidad. Si no se cierra con facilidad, quite la batería, de la vuelta e introdúzcala otra vez. Ahora no debería tener dificultades para cerrar el compartimiento.


Al cambiar las pilas, tenga en cuenta que las nuevas pueden tardar algunos minutos en funcionar a pleno rendimiento.

Cuando no esté utilizando su audífono, no olvide retirar la pila y dejar abierto el portapilas. Es necesario eliminar todo rastro de humedad de la pila.

Como colocarse los dispositivos auditivos

Sujete el molde auditivo entre los dedos pulgar e índice. Baje el volumen (si corresponde) para reducir la retroalimentación. Introduzca el molde en el canal auditivo. Deslice el molde auditivo con suavidad, girándolo ligeramente hasta que este firmemente colocado en la oreja. Presione ligeramente hacia adentro hasta sentirlo firme y cómodo. Deslice el dispositivo detrás de la oreja.

Cuando quiera quitarse el dispositivo, invierta el proceso de inserción. Con frecuencia, el molde auditivo se libera si empuja la parte posterior de la oreja.


FERNANDO DARIO
ALVAREZ ORDOÑEZ
G & G AUDIOLOGIA ARGENTINA S.R.L.
GERENTE GENERAL



AUDISER

G&G Audiología Argentina S.R.L.

Lavalle 1675 | 5° | Of. 7 | C1048AAM | Buenos Aires | Argentina
 Tel./Fax: (5411) 4372-2930 | (5411) 4371-3766
 consulta@audiser.com.ar | www.audiser.com.ar

Controles de volumen BTE

Los dispositivos para usar detrás de la oreja tienen una rueda o un interruptor oscilante para controlar el volumen.

La rueda tiene cuatro niveles de control de volumen; 1 (I) es la menor intensidad y 4 (IV) la máxima intensidad. Algunas ruedas de control de volumen no tienen números.

El interruptor oscilante regula el volumen progresivamente. Para reducir el volumen, presione la parte inferior (ancha) del control. Para aumentarlo, presione la parte superior (angosta). Algunos dispositivos con interruptor oscilante pueden emitir un sonido cuando se alcanzan las intensidades mínima y máxima.

Para ambos tipos de controles, regule el volumen que le resulte cómodo para cada oído. Al principio, tal vez prefiera hacer esto en un lugar silencioso mientras otra persona conversa normalmente.


Control de la pila

Cubra con la mano el audífono con el volumen alto. Un silbido indica que la pila funciona correctamente. Para conocer el estado de la pila también puede usar un comprobador de pilas.

Conmutador de función

Algunos dispositivos BTE pueden contar con un pulsador micrófono-teleespiral o un interruptor de micrófono-teleespiral-apagado (MTO).

El pulsador micrófono-teléfono conmuta los programas entre micrófono y teleespiral. El programa de micrófono se utiliza normalmente para escuchar. Pulse el botón para cambiar el programa a teleespiral.


 FERNANDO DARIO
 ALVAREZ ORDOÑEZ
 G & G AUDIOLOGIA ARGENTINA S.R.L.
 GERENTE GENERAL

AUDISER

G&G Audiología Argentina S.R.L.

Lávalle 1675 | 5° | Of. 7 | C1048AAM | Buenos Aires | Argentina
 Tel./Fax: (5411) 4372-2930 | (5411) 4371-3766
 consulta@audiser.com.ar | www.audiser.com.ar

El interruptor de micrófono-teleespiral-apagado tiene tres posiciones. Normalmente, el interruptor MTO se utiliza en la posición micrófono (M). se lleva a la posición teleespiral (T) el programa cambia a teleespiral.

En la posición teleespiral, tanto del pulsador micrófono-teleespiral como del interruptor micrófono-teleespiral-apagado, los dispositivos son compatibles con el campo electromagnético del teléfono de modo que usted podrá escuchar sin el sonido de silbido. (retroalimentación).

M: audífono encendido y micrófono conectado. Uso normal.

T: audífono encendido y bobina telefónica conectada. En lugares en los que se haya instalado un sistema de (bucle) aro magnético o cuando hable por teléfono, puede utilizar el audífono en esta posición, evitando que el ruido del entorno le moleste.

O: audífono apagado.

Tapa de controles de adaptación


Aunque se puede abrir esta tapa, por favor no lo haga y no intente jamás ajustar los tornillos a los que sirve de protección. Son los controles que ha ajustado su audioprotesista de acuerdo con sus necesidades auditivas. Solamente una persona calificada para ello puede realizar tales ajuste.

Conexión de entrada directa audio

Puede que su audífono disponga de una conexión de entrada directa audio (enchufe). Esto permite alimentar la señal de salida de un sistema de micrófono de radio (FM) u otro producto auxiliar directamente al amplificador del audífono con un cable Europlug estándar o receptor MLX Microlink y una base modificable que se conecta al audífono.

CUIDADO

Peligro de shock eléctrico!


 FERNANDO DARIO
 ALVAREZ ORDOÑEZ
 G & G AUDIOLOGIA ARGENTINA S.R.L.
 GERENTE GENERAL

8 2 3 7



AUDISER

G&G Audiología Argentina S.R.L.

Lavalle 1675 | 5° | Of. 7 | C1048AAM | Buenos Aires | Argentina
Tel./Fax: (5411) 4372-2930 | (5411) 4371-3766
consulta@audiser.com.ar | www.audiser.com.ar

Conecte la entrada de audio solo si la línea operada del aparato conforma los requerimientos de seguridad de IEC 65/BS EN 60065

Uso de su audífono

Los audífonos poseen un efecto inmediato, pero a menudo se les saca un mayor partido tras algunos meses durante los cuales se ha ido aprendiendo a mejorar la audición y a obtener el mayor provecho posible del audífono.

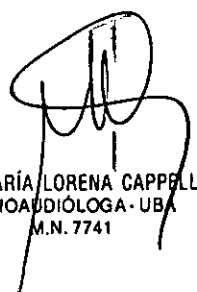
La duración de este periodo de adaptación varia de una persona a otra, dependiendo de varios factores, tales como el clima o el hecho de no haber utilizado un audífono con anterioridad, además del grado de disfunción auditiva del usuario.

A continuación indicamos cinco etapas fáciles de seguir para mejorar la audición:

- **En el silencio de su casa:** intente acostumbrarse a todo tipo de sonidos nuevos para ud. escuche toda la variedad existente de sonidos de fondo e intente identificar cada sonido concreto. Algunos sonidos serán distintos a los que ud. esta acostumbrado. Puede que ud. tenga que aprender a oírlos de nuevo. Si se cansa al utilizar el audífono, apáguelo y descanse. Poco a poco ira siendo capaz de escuchar durante un periodo mas largo. Poco tiempo después ud. será capaz de llevar su audífono, cómodamente, durante todo el día.
- **En conversación con una persona:** siéntese frente a otra persona para poder ver con claridad las expresiones de su cara y asegúrese de que no haya ruido en la habitación.
- **Al oír la radio o la televisión:** pida a una persona con audición normal que gradúe el volumen de la radio o de la televisión en un nivel agradable para ella. Empiece escuchando a los presentadores de informativos ya que estos suelen hablar con mucha claridad. Pruebe después con otro tipo de programas. Si le resulta muy difícil escuchar la radio o la televisión, su audioprotésista le aconsejara sobre las ayudas auditivas existentes.


FERNANDO DARIO
ALVAREZ ORDOÑEZ
G & G AUDIOLOGIA ARGENTINA S.R.L.
GERENTE GENERAL

34


Lic. MARÍA LORENA CAPPELLI
FONO AUDIÓLOGA - UBA
M.N. 7741

- o **En conversaciones en grupo:** en este tipo de situaciones, por ejemplo dentro de un restaurante, suele haber mucho ruido de fondo que resulta molesto; por lo tanto, concentre su atención en la persona a la que desea oír. Si se le escapa alguna palabra, pida a su interlocutor que se la repita.
- o **Al utilizar la bobina telefónica en la iglesia, en el teatro o en el cine:** cada vez existen más iglesias, cines y teatros, u otros lugares públicos, que cuentan con ayudas auditivas, por ejemplo bobinas de inducción. Este sistema emite sonidos por vía inalámbrica para que sean captados por el audífono a través de la bobina telefónica. Si este sistema está instalado en el lugar en el que ud. se encuentre, ponga su audífono en la posición para la bobina telefónica "T", con lo que su escucha mejorara considerablemente.

Utilice su audífono durante todo el día

Es posible que ud. se desenvuelva sin dificultad en situaciones sin su audición. Sin embargo, la única forma de conseguir mejorar su audición consiste en practicar la escucha hasta que ud. pueda llevar su audífono, cómodamente, durante todo el día.

En la mayoría de los casos, la utilización poco frecuente del audífono impide al usuario sacarle todo el provecho posible. Cuanto antes se acostumbre a los sonidos que le rodean, antes se olvidara de que está llevando un audífono.

El audífono no le permitirá recuperar una audición normal. Tampoco le evitará, ni mejorara, una disfunción auditiva por causas físicas. Lo que si hará sin embargo es ayudarlo a sacar un mayor provecho de su capacidad auditiva.



FERNANDO DARIO
ALVAREZ ORDOÑEZ
G & G AUDILOGIA ARGENTINA S.R.L.
GERENTE GENERAL



8 2 3 7

AUDISER

G&G Audiología Argentina S.R.L.

Lavalle 1675 | 5° | Of. 7 | C1048AAM | Buenos Aires | Argentina
Tel./Fax: (5411) 4372-2930 | (5411) 4371-3766
consulta@audiser.com.ar | www.audiser.com.ar


PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

1. Antes de utilizar su audífono, debe ud. familiarizarse con todo el contenido de este folleto, así como con las siguientes advertencias generales.
2. Utilice el audífono solamente según las indicaciones y con los ajustes realizados por su audioprotesista. Una utilización incorrecta puede provocar una pérdida auditiva permanente.
3. Los audífonos, sus componentes y las pilas no son juguetes y deben mantenerse alejados del alcance de cualquiera que pudiese ingerirlos o para evitar los daños que se podrían ocasionar.
4. Nunca permita que otras personas utilicen su audífono, ya que podría dañarles de forma permanente su capacidad auditiva.
5. Los audífonos pueden dejar de funcionar, por ej. Al terminarse la pila. Tenga en mente esta posibilidad, sobre todo cuando vaya conduciendo o cualquier circunstancia en la que ud. dependa de señales acústicas.
6. Evite el calor, la humedad y los productos químicos, su audífono no debe dejarse jamás en lugares con mucho calor, ni tampoco dentro de un vehículo aparcado al sol. También debe protegerse de las fuentes de humedad, como por ej. Baños calientes, la ducha o la lluvia. En caso de que su audífono haya estado expuesto a la humedad, le recomendamos que tras haber quitado la pila, lo coloque en un bote deshumidificador, para eliminar cualquier rastro de humedad que haya podido quedar dentro. Si la pila está húmeda, límpiela con cuidado.
7. Los productos químicos de los cosméticos, como la laca, el perfume o las lociones para después de afeitarse, así como los repelentes de mosquitos, pueden dañar su audífono. Por ello, debería quitarse siempre el audífono antes de usar estos productos y esperar a que se hayan secado antes de volvérselo a colocar. No se coloque nunca lociones bronceadoras sobre zonas de la piel que estén en contacto directo con el audífono.



FERNANDO DARIO
ALVAREZ ORDOÑEZ
G & G AUDIOLOGIA ARGENTINA S.R.L.
GERENTE GENERAL

36


Lic. MARÍA LORENA CAPPELLI
FONO AUDIÓLOGA - UBA
M.N. 7741



8 2 3 7

AUDISER

G&G Audiología Argentina S.R.L.

Lavalle 1675 | 5° | Of. 7 | C1048AAM | Buenos Aires | Argentina
Tel./Fax: (5411) 4372-2930 | (5411) 4371-3766
consulta@audiser.com.ar | www.audiser.com.ar

CUIDADO DE SU AUDÍFONO

Cuando manipule su audífono, manténgalo sobre una superficie blanda para evitar que se estropee si se cae. Antes de irse a dormir, limpie el audífono y el molde del oído con un paño seco y suave. Asegúrese de que no queda cerumen en ninguno de los orificios del molde ya que la cera puede reducir la eficacia del audífono. Abra el portapilas para que el aire elimine la humedad.

Limpieza del molde del oído: el molde debe lavarse con frecuencia.

- Desconecte el molde y el tubo de plástico del audífono
- Lave el molde con agua templada y jabón neutro. No utilice detergentes abrasivos. **¡El audífono propiamente dicho jamás debe lavarse!**
- Enjuague el molde con agua.
- Séquelo con un paño
- Elimine, soplando con un soplador de aires, el agua que haya quedado dentro del molde del oído o del tubo de plástico. Se puede adquirir uno de estos sopladores de aires para realizar esta operación, en la farmacia o a través de su audioprotesista.
- Asegúrese de que el molde del oído y el tubo de plástico están totalmente seos antes de volver a conectarlos al audífono.

Sustitución del tubo plástico.

El tubo de conexión entre el molde del oído y el audífono debe ser reemplazado cuando amarillee o este rígido. Consulte a su audioprotesista sobre este tema.

F. ALVAREZ

FERNANDO DARIO
ALVAREZ ORDÓÑEZ
G & G AUDIOLOGIA ARGENTINA S.R.L.
GERENTE GENERAL

37

M. LORENA

Lic. MARÍA LORENA CAPPELLI
FONOAUDIÓLOGA - UBA
M.N. 7741

AUDISER

G&G Audiología Argentina S.R.L.

Lavalle 1675 | 5° | Of. 7 | C1048AAM | Buenos Aires | Argentina
 Tel./Fax: (5411) 4372-2930 | (5411) 4371-3766
 consulta@audiser.com.ar | www.audiser.com.ar

Abertura del micrófono

Si entra suciedad en la abertura del micrófono, muy probablemente el rendimiento del audífono descenderá considerablemente, por lo que deberá llevarlo a su audioprotesista para su limpieza.

¡No trate jamás de limpiar la abertura del micrófono con agua ni con detergentes!

Problemas habituales y sus soluciones

Efecto	Causa	Solución
Pitido o ruido silbante	Cerumen acumulado en el canal auditivo	Acudir a que su medico examine su canal auditivo
	Molde del oído insertado incorrectamente	Volver a insertar el molde del oído y el audífono
	Tubo de plástico roto o deteriorado	Sustituir el tubo de plástico
Ausencia de sonido	Molde del oído obstruido	Limpiar el molde del oído
	Pila gastada	Sustituir la pila
	audífono funcionando en la posición "T" o apagado	Cambiar a la posición "M"
	Contactos con la pila sucios o corroídos	Abrir y cerrar el portapilas varias veces o sustituir la pila
Ligero zumbido o ruido similar al del motor de una lancha motora que se va apagando	Contactos con la pila sucios o corroídos	Abrir y cerrar el portapilas varias veces o sustituir la pila
	Pila sucia o corroída	Limpiar la superficie de la pila con un paño seco
	Pila gastada	Sustituir la pila
Si ninguna de las soluciones mencionadas resuelve el problema, solicite ayuda a su audioprotesista.		

FERNANDO DARIÓ
 ALVAREZ ORDOÑEZ
 G & G AUDIOLOGIA ARGENTINA S.R.L.
 GERENTE GENERAL

Lic. MARÍA LORENA CAPPELLI
 FONOAUDIÓLOGA - UBA
 M.N. 7741