



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

DISPOSICIÓN N° 8001

BUENOS AIRES, 17 JUL 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-4270-16-0 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma DIS DEN ODONTOLOGÍA DE HORACIO Y NORBERTO CALAMANTE S.H. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-640-67, denominado MATERIALES PARA ORTODONCIA, marca ORTHO TECHNOLOGY.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de diciembre del 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-640-67, correspondiente al producto médico denominado: MATERIALES PARA ORTODONCIA, marca ORTHO TECHNOLOGY, propiedad de la

E H



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.E.*

DISPOSICIÓN Nº **8001**

firma DIS-DEN ODONTOLOGÍA DE HORACIO Y NORBERTO CALAMANTE S.H. obtenido a través de la Disposición ANMAT Nº 6182 de fecha 13 de septiembre de 2011 y sus rectificatorias y modificatorias, según lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-640-67, denominado: MATERIALES PARA ORTODONCIA, marca ORTHO TECHNOLOGY

ARTÍCULO 3º.- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-640-67.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, Rótulos e Instrucciones de Uso autorizados; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Autorización de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-3110-4270-16-0

DISPOSICIÓN Nº

msm

8001


Dr. CARLOS CHIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.E.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. I.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **8001**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-640-67 y de acuerdo a lo solicitado por la firma DIS DEN ODONTOLOGÍA DE HORACIO Y NORBERTO CALAMANTE S.H., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: MATERIALES PARA ORTODONCIA.

Marca: ORTHO TECHNOLOGY.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 6182/11

Tramitado por expediente N° 1-47-2212-11-1

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos	13 de septiembre de 2016	13 de septiembre de 2021
Modelos	Brackets, Bandas y Accesorios (Brackets de Cerámica, Brackets de Composite, Brackets de acero inoxidable, Bandas Ortodónticas, Tubos Bucales, Accesorios) Expansores (barras palatinas, retenedores, expansores palatales) Cera Intraoral Ortodóntica Instrumentos	Accesorios de ortodoncia Ganchos para arco Ganchos de bola bidireccionales Guía de mordida crimpable Ganchos de bola crimpables Tubos cruzados crimpables Tubos dobles crimpables Ministops crimpables Stops de adhesión directa Botones de adhesión directa Cadena para erupción dentaria Mantenedor de espacio EZ

E H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>Ortodónticos (Alicates Falcon, Alicates Pantera, Instrumentos de mano ortodónticos Falcon, Espejos Bucales, Retractores y Abrebocas, Discos Interproximales, Cubetas) Productos Alámbricos (Alambres y arcos de níquel titanio, Alambres y arcos de acero inoxidable, Arcos y Alambres de Titanio, Resortes de níquel titanio y acero inoxidable, Ligaduras, Separadores) Tornillos y Anclajes Productos Elastoméricos (Separadores, Ligaduras, Elásticos, Gomas, Cuñas de rotación) Productos Intra Extra Orales (Arcos Faciales, Mascaras Faciales, Lip Bumper, Módulos de Seguridad, Casquetes, Almohadilla cervical para tracciones de seguridad, Protectores de Boca)</p>	<p>Deslizador EZ Levantador de mordida Guray Botón lingual Grapa lingual adherible Grapa lingual soldable Vainas linguales Orejetas adheribles y presoldadas Domadores linguales Aplicador de stops Score crimpable Alambre de titanio beta Arcos BetaForce de titanio beta Arcos BetaForce de titanio beta en varillas Alambre azul Colboly Aplicador de brackets Brackets cerámicos Bracket Encore Roth .018/.022 Bracket Encore McLaughlin Bennett & Trevisi .018/.022 Bracket Encore estándar Edgewise .018/.022 Bracket Pure Roth .018/.022 Bracket Pure McLaughlin Bennett & Trevisi .018/.022 Bracket Pure estándar Edgewise .018/.022 Bracket Reflections Roth .018/.022 Bracket Reflections Roth V-Slot .018/.022 Bracket Reflections McLaughlin Bennett & Trevisi .018/.022 Bracket Reflections bioprogresivo Ricketts/Hilgers .018/.022 Bracket Reflections estándar Edgewise .018/.022 Bracket Sensation autoligable Roth 0.022 Brackets de composite Bracket Avalon Roth .018/.022 Bracket Avalon McLaughlin Bennett & Trevisi .018/.022 Bracket Avalon estándar Edgewise .018/.022</p>
--	---	--

Σ H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		Bracket OrthoFlex Roth .018/.022 Bracket OrthoFlex McLaughlin Bennett & Trevisi .018/.022 Bracket OrthoFlex estándar Edgewise .018/.022 Bracket OrthoFlex claro Roth .018/.022 Bracket OrthoFlex claro McLaughlin Bennett & Trevisi .018/.022 Bracket OrthoFlex claro estándar Edgewise .018/.022 Bracket Rave Roth .018/.022 Bracket Rave estándar Edgewise .018/.022 Instrumentos dentales Instrumentos de mano para ortodoncia Falcon Alicates/Instrumentos de mano para ortodoncia Falcon Alicates/Instrumentos para ortodoncia Pantera Instrumentos de mano X7 Retractores dentales Arcos faciales Aparatos extraorales Máscaras faciales multiajustables Módulos de liberación de seguridad Almohadilla cervical Aparatología de tracción alta Máscaras faciales de fuerza inversa Protector labial Cera dental intraoral Cera dental Cera dental en bandas Espejo de boca Alambre de níquel titanio Arco de níquel titanio pretorque Arco de níquel titanio y cobre TruFlex Arco de níquel titanio TruFlex Arco de níquel titanio TruFlex en varillas Arco de níquel titanio TruFlex en bobina
--	--	--

E H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		Arco de níquel titanio TruFlex térmico Arco de níquel titanio TriFecta térmico Arco de níquel titanio TruGold Arco de níquel titanio TruGold térmico Arco de alambre en tono de diente Arco de alambre de forma universal Tubo de ortodoncia bucal Tubo TruCast .018/.022 Tubo TruEase .018/.022 Tubo TruFit 2.0 .018/.022 Tubo Votion .018/.022 Productos elastoméricos para ortodoncia Ligaduras elastoméricas Módulos de enlace trasero B Cadena elástica Power Ligaduras elásticas Power Stick Elásticos de ortodoncia (Criaturas marinas) Elásticos extraorales Separadores Elastoloop Cuñas de rotación Separadores opacos Elástico, sólido o hueco Tornillo de retención para expansión ortodonctica Expansores palatinos rápidos Tornillos de expansión Resortes de ortodoncia Resortes de ortodoncia Resortes cerrados Resortes de impacto y de separación Resortes de NiTi para distalización Resortes abiertos Resortes de rotación y de enderezamiento Accesorios para pacientes Protector Comfort Cover Protector Ultra-Guard
--	--	--

E H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		Cubetas de impresión preformadas Mantenedor de espacio preformado para ortodoncia Retenedor lingual adherible Barra de arco palatina Brackets de metal Bracket Bionic Roth .018/.022 Bracket Bionic Roth V-Slot .018/.022 Bracket Bionic bioprogresivo Ricketts/Hilgers .018/.022 Bracket Bionic McLaughlin Bennett & Trevisi .018/.022 Bracket Bionic estándar Edgewise .018/.022 Bracket Lotus Plus autoligable Roth 0.022 Bracket Lotus Plus autoligable McLaughlin Bennett & Trevisi 0.022 Bracket Lotus Plus autoligable Damon 0.022 Bracket Lotus Plus Starter Kits Pinzas de repuesto Lotus y Lotus Plus Bracket Marquis Roth .018/.022 Bracket Marquis estándar Edgewise .018/.022 Bracket Marquis McLaughlin Bennett & Trevisi .018/.022 Bracket Microtech Plus cromo cobalto McLaughlin Bennett & Trevisi .018/.022 Bracket Microtech Plus cromo cobalto Roth .018/.022 Bracket Pinnacle McLaughlin Bennett & Trevisi .018/.022 Bracket Pinnacle Roth .018/.022 Bracket TruGold Marquis Roth .018/.022 Bracket Sensation M Roth .018/.022 Bracket Sensation M McLaughlin Bennett & Trevisi .018/.022 Bracket Votion Roth .018/.022
--	--	---

E. H.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		Bracket Votion McLaughlin Bennett & Trevisi .018/.022 Alambre de acero inoxidable Alambre trenzado Arco de alambre de acero inoxidable TruForce Arco de alambre de acero inoxidable TruForce en bobina Alambre de acero inoxidable en varillas Alambre coaxial Alambre retorcido Resorte abierto en bobina Resorte cerrado en bobina Ligaduras Kobayashi Ligaduras preformadas Arco de alambre en tono de diente Arco de alambre de acero inoxidable bañado en oro TruGold Ligaduras preformadas TruGold Ligaduras cortas preformadas TruGold Arco de alambre de forma universal
Lugar de elaboración	17401 Commerce Park Boulevard, Tampa, FL 33647	4614 Pet Lane, Suite D-101, Lutz, FL 33559, Estados Unidos
Periodo de Vida Útil	10 años	No Aplica. Para productos elastoméricos y cera dental: 3 años

E H



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Proyecto de Rótulo	Autorizado según Disposición ANMAT N°6182/11	A fs.119
Proyecto de Instrucciones de Uso	Autorizado según Disposición ANMAT N°6182/11	A fs. 120 a 123

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma DIS DEN ODONTOLOGÍA DE HORACIO Y NORBERTO CALAMANTE S.H., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-640-67, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **17 JUL 2017**

Expediente N° 1-47-3110-4270-16-0

DISPOSICIÓN N°

30011


Dr. CARLOS CHIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



PROYECTO DE ROTULO PRODUCTOS SIN FECHA DE VENCIMIENTO

MATERIALES PARA ORTODONCIA

FABRICANTE: ORTHO TECHNOLOGY, INC-4614 PET LANE, SUITE D-101, LUTZ, FL 33559,
ESTADOS UNIDOS

IMPORTADOR: DIS-DEN ODONTOLOGÍA DE HORACIO Y NORBERTO CALAMANTE S.H - SANTA FE
3153, ROSARIO – PROV. DE SANTA FE- ARGENTINA

8001

17 JUL 2017

MODELO: XXX

LOTE: XXX

ADVERTENCIAS PRODUCTOS CON NÍQUEL: NO USAR EN PACIENTES CON ALERGIA AL NÍQUEL.

ESTOS PRODUCTOS NO REQUIEREN CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO.

DT: FARM. CLAUDIA R. GREPPI, MATRÍCULA Nº 3166

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T PM- 640 – 67

PROYECTO DE ROTULO PRODUCTOS CON FECHA DE VENCIMIENTO

MATERIALES PARA ORTODONCIA

FABRICANTE: ORTHO TECHNOLOGY, INC-4614 PET LANE, SUITE D-101, LUTZ, FL 33559,
ESTADOS UNIDOS

IMPORTADOR: DIS-DEN ODONTOLOGÍA DE HORACIO Y NORBERTO CALAMANTE S.H - SANTA FE
3153, ROSARIO – PROV. DE SANTA FE- ARGENTINA

MODELO: XXX

LOTE: XXX

FECHA DE VTO.: XXX

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, FUERA DEL SOL

ADVERTENCIA PARA PRODUCTOS CON LATEX: NO USAR EN PACIENTES CON ALERGIA AL LATEX.

DT: FARM. CLAUDIA R. GREPPI, MATRÍCULA Nº 3166

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T PM- 640 – 67

E

~~HORACIO y NORBERTO CALAMANTE S.H
SANTA FE 3153
C.U.I.T. N° 20-68469384-7~~

*CLAUDIA R. GREPPI
FARMACEUTICA
MAT. 3166*


INSTRUCCIONES DE USO



800 00 00 00

MATERIALES PARA ORTODONCIA

FABRICANTE: ORTHO TECHNOLOGY, INC-4614 PET LANE, SUITE D-101, LUTZ, FL 33559, ESTADOS UNIDOS
IMPORTADOR: DIS-DEN ODONTOLÓGIA DE HORACIO Y NORBERTO CALAMANTE S.H - SANTA FE 3153, ROSARIO -
PROV. DE SANTA FE- ARGENTINA
INSTRUCCIONES DE USO BRACKET LOTUS

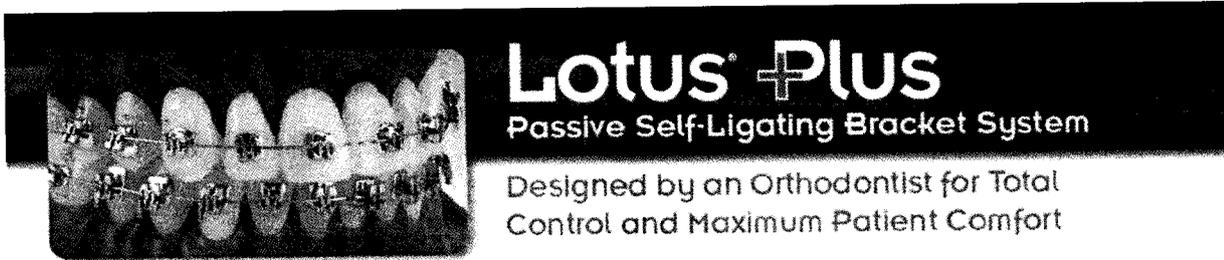


SISTEMA DE AUTOLIGADO PASIVO

FACIL APERTURA DEL BRACKET LOTUS: SE ABRE FÁCILMENTE Y NO REQUIERE HERRAMIENTAS ESPECIALES. SIMPLEMENTE INSERTE EL EXTREMO DE UN EXPLORADOR EN EL ESPACIO CIRCULAR SITUADO JUSTO DEBAJO DE LA RANURA DEL ARCO. GIRE EL EXPLORADOR HACIA ABAJO CON UN MOVIMIENTO SUAVE DE 45°.

NO TIRE DEL CLIP HACIA ABAJO, YA QUE ESTO CONVERTIRÁ EL SOPORTE. EL CLIP HARÁ "CLICK" UNA VEZ QUE SE DESACTIVA EL BLOQUEO SUPERIOR Y HARÁ "CLICK" UNA SEGUNDA VEZ CUANDO ESTE COMPLETAMENTE ABIERTO.

CIERRE SEGURO DEL BRACKET LOTUS:

UTILIZANDO UN ALICATE O UNA PINZA ABIERTO COLOQUE LA PUNTA DEL INSTRUMENTO EN LA PARTE SUPERIOR DEL BRACKET Y LA OTRA PUNTA ABIERTA EN LA PARTE INFERIOR DEL CLIP ABIERTO. PRESIONE SUAVEMENTE EL ALICATE O PINZA Y EL CLIP COMENZARÁ A DESPLAZARSE HACIA ARRIBA. SE OIRÁ UN "CLICK" UNA VEZ QUE SE DESACTIVA EL BLOQUEO INFERIOR Y OIRA UN NUEVO "CLICK" CUANDO ESTE CERRADO.

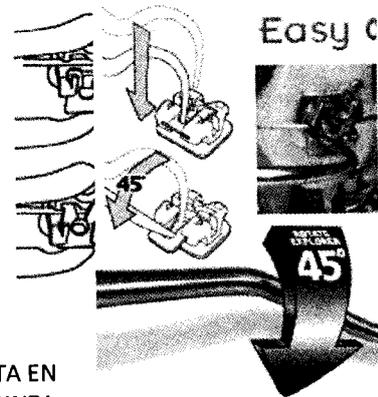



TERMINAR CON CONTROL

-BRACKET CONVERTIBLE

SI LO DESEA, DURANTE LA FASE DEL ACABADO, LOS CLIPS PUEDEN SER FÁCILMENTE REMOVIDOS Y LAS LIGADURAS PUEDEN ASEGURAR EL ARCO EN LA RANURA.

-PARA CONVERTIR EL BRACKET


TIRE DEL CLIP HACIA ABAJO PARA QUITARLO CUANDO DESEE DESENGANCHAR EL CLIP Y CONVERTIR EL BRACKET.

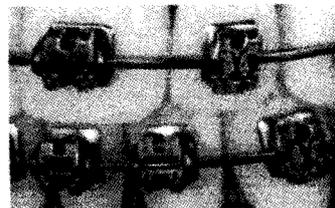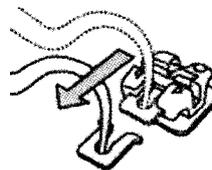

HORACIO y NORBERTO CALAMANTE S.H
SANTA FE 3153
C.U.I.T. 30-68469384-7

CLAUDIO R. GREPPI
FARMACEUTICA
MAT. 3166

INSTRUCCIONES DE USO BRACKETS REFLECTIONS, ENCORE, PURE

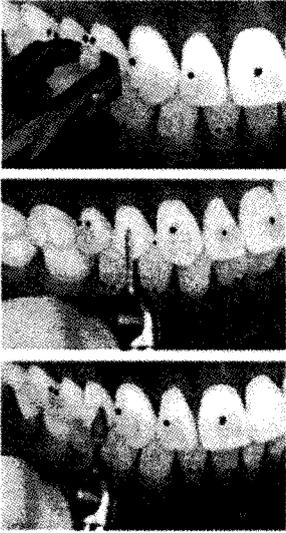

Instrucciones para Quitar el Cemento

1. Quite todas las ligaduras y alambres.,
2. Agarre el bracket a lo largo del borde meso-distal y de la oclusión de la encía con una pinza de despegar, recta o angular, de su elección, en el punto de contacto entre el garfio y el adhesivo. Apriete la pinza con cuidado, y gradualmente aumente la presión hasta que el bracket se suelte del diente. No tuerza ni jale el bracket.
3. Quite el adhesivo restante con una fresa de raspar de alta velocidad o una pinza de quitar adhesivo.
4. Después de quitar el grueso del adhesivo, siga con una fresa de pulir esmalte, de alta o baja velocidad.

Nota: En el caso de que los restos de adhesivo rodeen los brackets antes de quitarlo (Paso 2), se recomienda quitar dichos restos con una fresa de raspar de alta velocidad.

INSTRUCCIONES DE USO BRACKETS SENSATION

-PARA ABRIR

PARA ABRIR EL CLIP DE RESORTE DEL BRACKET DE AUTOLIGADO ACTIVO, COLOQUE EL INSTRUMENTO SOBRE LA RANURA DEL CLIP ABIERTO ABAJO DE LA INTERFAZ DEL BRACKET Y EMPUJE SUAVEMENTE EN SENTIDO OCLUSAL PARA DESENGANCHAR EL CLIP DEL BRACKET. COLOQUE EL INSTRUMENTO A CONTINUACIÓN DIRECTAMENTE EN LA ABERTURA FACIAL DEL CLIP PARA ENGANCHAR LA PEQUEÑA EXTENSIÓN DEL CLIP DE RESORTE. TIRE EN SENTIDO DE LA DIRECCIÓN OCLUSAL. EL CLIP DE RESORTE SE VA A ABRIR.

-PARA CERRAR

PARA CERRAR EL CLIP DE RESORTE DEL BRACKET DE AUTOLIGADO ACTIVO SERIE M SENSATION, SIMPLEMENTE APLIQUE PRESIÓN LIGERA CON EL DEDO SOBRE LA SUPERFICIE OCLUSAL DEL BRACKET. ASEGÚRESE QUE EL CLIP DE RESORTE SE CIERRE COMPLETAMENTE DE MANERA QUE EL ALAMBRE DE ARCO ESTÉ FIRMEMENTE ENGARZADO.


INSTRUCCIONES DE USO LEVANTADOR DE MORDIDA GURAY

1-INSERTE LAS ALAS PROXIMALES DEL BITE RAISER DENTRO DE LA BANDA MOLAR DEL TUBO DE TRACCION EXTRAORAL


2-ATE LAS ALAS PROXIMALES AL TUBO DE TRACCION EXTRAORAL USANDO UNA LIGADURA DE ACERO INOXIDABLE SEGUIDA DE UN SEPARADOR ELASTOMERICO.

3-SUPERPONGA EL BITE RAISER SOBRE LA SUPERFICIE OCLUSAL DEL MOLAR Y ATE EL RAMAL "T" AL BOTON PALATAL O AL RETENEDOR LINGUAL CON UN SEPARADOR ELASTOMERICO.

4-NOTA SE RECOMIENDA EL USO BILATERAL. DURANTE EL TRATAMIENTO CLINICO, SE PUEDE CORTAR LA ATADURA PALATAL, EL BITE RAISER ESTA ABISAGRADO EN EL TUBO DE TRACCION EXTRAORAL PERMITIENDO QUE SE COMPRUEBEN LAS OCLUSIONES. VUELVA A ATAR SI SE NECESITA TIEMPO ADICIONAL, EXTRAIGA SI EL TRATAMIENTO ESTA COMPLETO. SI SE NECESITA MAYOR DISTANCIA VERTICAL, DOBLE EL RAMAL "T" AL LADO OPUESTO. ESTO AUMENTARA LA MORDIDA QUE YA ESTA ELEVADA.

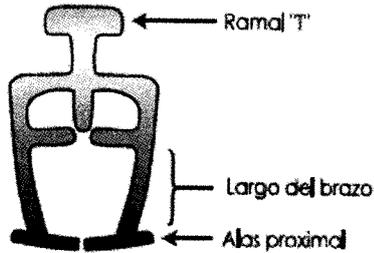


INSTRUCCIONES DE USO MANTENEDOR DE ESPACIO EZ

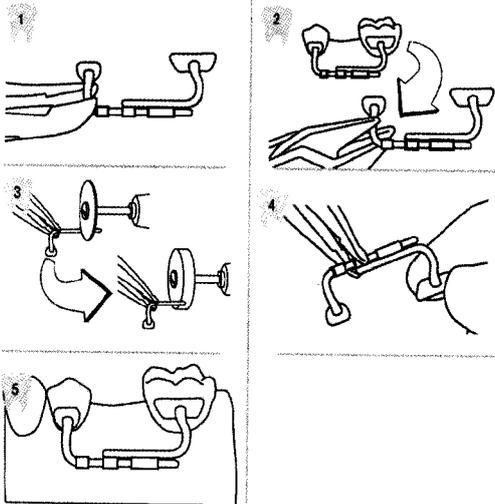

PARA MANTENER EL ESPACIO SELECCIONE EL ESPACIADOR CORRESPONDIENTE POR SU COLOR Y EXTRAIGA EL RESORTE ESPIRAL. (VERDE - DERECHA SUPERIOR, AMARILLO - IZQUIERDO SUPERIOR, ROJO - INFERIOR DERECHO, BLANCO - INFERIOR IZQUIERDO)

1. MIENTRAS QUE SOSTIENE EL ESPACIADOR EN SU SITIO CON LOS ALICATES, AJUSTE EL LARGO DEL ESPACIADOR.
2. COMPRUEBE OCLUSALMENTE PARA ASEGURARSE DE QUE LAS BASES SE ADAPTEN PERFECTAMENTE A LA SUPERFICIE DEL DIENTE. SI ES NECESARIO, SE PUEDE EFECTUAR UNA ADAPTACIÓN ADICIONAL.
3. SI SE NECESITA EL AJUSTE MÁS CORTO PARA UN ESPACIO PEQUEÑO, HABRÁ QUE RECORTAR LA VARILLA DEL ESPACIADOR Y SE DEBE PULIR PARA MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE.
4. ASEGURE EL LARGO Y LA ORIENTACIÓN DEL ESPACIADOR PRESIONANDO EL TOPE CON UN ALICATE.
5. PREPARE LA SUPERFICIE DEL DIENTE CON ÁCIDO DURANTE UN MINUTO. ENJUAGUE Y SEQUE COMPLETAMENTE. LIGUE EL RETENEDOR USANDO ADHESIVO PARA ORTODONCIA FOTOCURADO, APLIQUE FOTOCURADO A CADA DIENTE

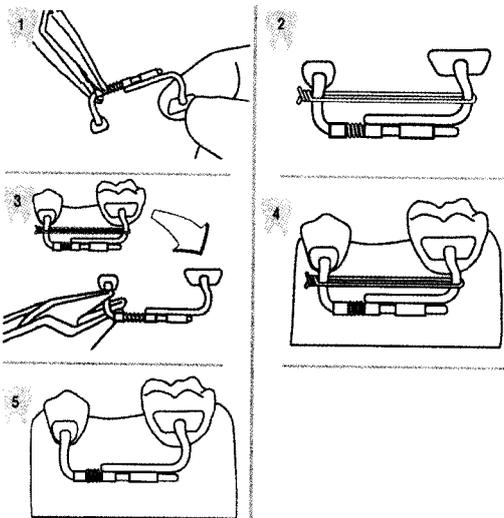

PARA RECUPERAR EL ESPACIO SELECCIONE EL ESPACIADOR CORRECTO EN BASE A SU MARCA DE COLOR. (VERDE - SUPERIOR DERECHA, AMARILLO - SUPERIOR IZQUIERDO, ROJO - INFERIOR DERECHO, BLANCO - INFERIOR IZQUIERDO)

1. ANTES DE ACCIONAR EL RESORTE ESPIRAL, PRESIONE EL TOPE USANDO UN ALICATE.
2. AJUSTE EL LARGO DEL ESPACIADOR APLICANDO UNA FUERZA DE DEPRESIÓN CON ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE DE LIGAR CON UN INSTRUMENTO MATHIEU. RETUERZA LENTAMENTE EL ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE PARA LIGAR HASTA LOGRAR EL LARGO NECESARIO.
3. USANDO LOS ALICATES, COMPRUEBE OCUSALMENTE PARA ASEGURARSE DE QUE LAS BASES SE ADAPTEN PERFECTAMENTE A LAS SUPERFICIES DEL DIENTE. SI ES NECESARIO, SE PUEDE EFECTUAR UNA ADAPTACIÓN ADICIONAL USANDO LOS ALICATES.
4. PREPARE LA SUPERFICIE DEL DIENTE CON ÁCIDO DURANTE UN MINUTO. ENJUAGUE Y SEQUE COMPLETAMENTE. LIGUE EL RETENEDOR USANDO ADHESIVO PARA ORTODONCIA FOTOCURADO Y APLIQUE FOTOCURADO A CADA DIENTE.
5. CORTE EL ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE PARA LIGAR. EL ESPACIADOR COMENZARÁ A APLICAR FUERZA PARA VOLVER A GANAR EL ESPACIO PERDIDO AL ENDEREZAR EL DIENTE ADYACENTE. (PRESTE ATENCIÓN A LAS NORMAS DE ANCLAJE).

8001



INSTRUCCIONES DE ARCOS Y ALAMBRES DE ORTODONCIA

1. SELECCIONAR TAMAÑO Y MEDIDA ADECUADA DEL ARCO (.016X.022, .016X.025, .017X.025, .018X.025 Ó .019X.025
2. AJUSTAR EL ANCHO Y LA FORMA AL TAMAÑO Y FORMA DE ARCADEA DENTARIA DEL PACIENTE.
3. INTRODUCIR EL ARCO EN LA RANURA DE LOS BRACKET.
4. COMPROBAR QUE LA SUJECIÓN DE LOS ELEMENTOS AUXILIARES ES CORRECTA (BANDAS, TUBOS, Y ACCESORIOS DE ORTODONCIA, ETC) Y EN CASO CONTRARIO PUEDE DOBLARSE PARA QUE MEJORE ESTE ACOPLAMIENTO.

INSTRUCCIONES ARCOS FACIALES Y APARATOS EXTRAORALES, ALMOHADILLAS Y MODULOS DE SEGURIDAD

1. SELECCION DEL TAMAÑO ADECUADO DEL ANCLAJE DE FUERZA EXTRAORAL SEGÚN LA CABEZA DEL PACIENTE Y EL MODELO DE MENTONERA DESEADO. (LAS MEDICIONES SE BASAN EN EL CENTRO DE LAZO AL CENTRO DEL LAZO OPUESTO DEL ARCO INTERIOR)
2. COLOCAR EL APARATO COMPLETO EN LA POSICIÓN QUE SE DESEA ACUMULE LA FUERZA.
3. AJUSTAR Y COMPROBAR LA POSICIÓN Y LA LONGITUD DE LA CORREA DE PLÁSTICO MIDIENDO LA FUERZA QUE REALMENTE SE APLICA EN LA POSICIÓN DE TRATAMIENTO.
4. QUITAR EL PRODUCTO Y COMPROBAR QUE EL PACIENTE LO SITÚA CORRECTAMENTE. ESTABLECER EL TIEMPO DE UTILIZACIÓN DIARIA.

INSTRUCCIONES MASCARA FACIAL MULTIAJUSTABLE:

1. COLOQUE LA CURVA EN LA BARRA VERTICAL SOBRE LA NARIZ.
2. APOYE LA FRENTE EN LA PARTE CENTRAL Y ASEGÚRELA EN POSICIÓN.
3. CENTRE LA BARBILLA EN EL MENTÓN Y ASEGÚRELA EN LA POSICIÓN.
4. COLOQUE LA BARRA TRANSVERSAL APROXIMADAMENTE 2, 0 MM POR DEBAJO DEL LABIO SUPERIOR Y BLOQUEE EN POSICIÓN.

INSTRUCCIONES MASCARA FACIAL DE FUERZA INVERSA:

1. AJUSTE EN EL CENTRO DE LA BARBILLA Y ASEGÚRELA EN POSICIÓN.
2. AJUSTE EL SOPORTE DE LA FRENTE Y ASEGÚRELA EN POSICIÓN.
3. DESLICE LA BARRA TRANSVERSAL CENTRAL HASTA LA POSICIÓN DESEADA Y ASEGÚRELA EN POSICIÓN.
4. COLOQUE EL ELÁSTICO EN EL SOPORTE O EL GANCHO DE ALAMBRE Y ESTIRE HACIA ADELANTE PARA COLOCARLO EN LA BARRA TRANSVERSAL.

INSTRUCCIONES PROTECTORES LABIALES:

1. CORTAR EL LARGO DE PRODUCTO DESEADO SEGUN LA DENTADURA DEL PACIENTE
2. COLOCAR EN LOS BRACKETS

ADVERTENCIAS PRODUCTOS CON NÍQUEL: NO USAR EN PACIENTES CON ALERGIA AL NÍQUEL.
ESTOS PRODUCTOS NO REQUIEREN CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO.

INSTRUCCIONES DE USO PRODUCTOS ELASTOMERICOS:

SE DEBE SELECCIONAR EL PRODUCTO ELASTOMERICO ADECUADO PARA CADA CASO Y DEBE SER ANCLADAS EN OTROS DISPOSITIVOS ORTODÓNTICOS COMO GANCHOS, TUBOS, ETC QUE SON FIJADOS EN LOS DIENTES A TRAVÉS DE ENCOLADO O EN EL CASO DE COMPONENTES PARA SOLDADURA, LAS MISMAS SON FIJADAS EN BANDAS ORTODÓNTICAS.

ADVERTENCIA PARA PRODUCTOS CON LATEX: NO USAR EN PACIENTES CON ALERGIA AL LATEX.

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, FUERA DEL SOL.

HORACIO y NORBERTO CALAMANTE S.H
SANTA FE 3168
C.U.I.T. N° 30688469384-7

CLAUDIA B. PREPPI
FARMACÉUTICA
MAT. 3168