



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

6573

BUENOS AIRES, 14 JUN 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-1150-17-9 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma Kopelco S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1105-19, denominado: Preservativos Masculinos de Látex de Caucho Natural, marca Tulipán- Gentleman- 4UP by Tulipán.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1105-19, correspondiente al producto médico denominado: Preservativos Masculinos de Látex de Caucho Natural, marca Tulipán- Gentleman- 4UP by Tulipán, propiedad de la firma Kopelco S.A. obtenido a

E 1



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° **6 5 7 3**

través de la Disposición ANMAT N° 2200 de fecha 18 de abril de 2012, según lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1105-19, denominado: Preservativos Masculinos de Látex de Caucho Natural, marca Tulipán- Gentleman- 4UP by Tulipán.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1105-19.

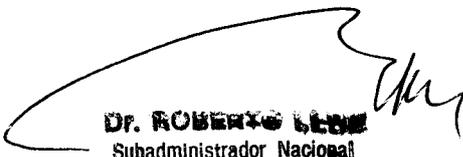
ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-1150-17-9

DISPOSICIÓN N°

LP

**6 5 7 3**

  
**Dr. ROBERTO LILLO**  
Subadministrador Nacional  
A. N. M. A. T.



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **6573**, a los efectos de su anexado en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1105-19 y de acuerdo a lo solicitado por la firma Kopelco S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Preservativos Masculinos de Látex de Caucho Natural.

Marca: Tulipán- Gentleman- 4UP by Tulipán.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 2200/12 de fecha 18 de abril de 2012.

Tramitado por expediente N° 1-47-19710-11-6.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos	18 de abril de 2017	18 de abril de 2022
Marca	Tulipán- Gentleman- 4UP by Tulipán.	Tulipán- Gentleman- 4UP by Tulipán- 4U by Tulipán.
Rótulos	Aprobado por Disposición ANMAT N° 2200/12.	A fs.159 a 176.

E

1



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

Instrucciones de uso	Aprobado por Disposición ANMAT N° 2200/12.	A fs. 159 a 176.
----------------------	--	------------------

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma Kopelco S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1105-19, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días.....**14 JUN 2017**

Expediente N° 1-47-3110-1150-17-9

DISPOSICIÓN N°

*E*

**6573**

**Dr. ROBERTO LEDESMA**  
Subadministrador Nacional  
A. N. M. A. T.



6573

14 JUN 2017

**2. RÓTULOS (2318/2002)**

**2.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

**2.1.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

**2.2 CONTIENE 1 PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, ULTRA FINO** LUBRICADO CON SILICONA, LISOS, INCOLOROS CON RESERVORIO.

**2.3 NO CORRESPONDE**

**2.4 CÓDIGO/LOTE: XXXX.**

**2.5 FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**2.6 PRODUCTO DE UN SÓLO USO.**

**2.7 PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.**

**2.8 LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO**

**a)** Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).

**b)** Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.

**c)** Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.

**d)** Después de usar el preservativo **NO LO TIRES AL INODORO**, sino al cesto de residuos.

No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

**2.9 NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES** (anillos, hebillas, uñas). **NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

**2.10 NO CORRESPONDE**

**2.11 DIRECTOR TÉCNICO FARM. CLAUDIO PAREJA**

DR. FELIPE KOPELOWICZ  
DIRECTOR  
KOPELCO S.A.

**I- RÓTULOS (2337/2002) I-3-ENVASE PRIMARIO**

**A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL**  
Marcas: **TULIPÁN- GENTLEMAN- 4 UP by TULIPÁN-4U by TULIPÁN.**

**B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**C) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).**

**D) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.  
**PRODUCTO VENTA LIBRE.**

**E) 53 MM DE ANCHO NOMINAL.**

**F) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

**G) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE USO.**

**H) LUBRICADO CON SILICONA**

**I-4-ENVASE DE CONSUMO**

**I-4-1 CARA PRINCIPAL**

**A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL**  
Marcas: **TULIPÁN- GENTLEMAN- 4 UP by TULIPÁN-4U by TULIPÁN.**

**B) LISOS, ULTRA FINO**

**C) CONTIENE 3, 4, 6 O 12 UNIDADES DE PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**D) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).**

**I-4-2 OTRAS CARAS**

**A) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** ARCADINI 4411 (EX671) C.P. B1650HBC SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

**A1) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA

CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.



KOPELCO

## ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

M.N. 10484 - M.P. —

2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.

LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

C) NO FRACCIONAR.

D) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.

E) DIRECTOR TÉCNICO: FARM. CLAUDIO PAREJA M.N. 10484 - M.P. —

F) PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, HUMEDAD Y DE LA LUZ.

G) ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 0800-777-0008.

H) PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, LUBRICADOS CON SILICONA

I) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. Y LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

## 3 INSTRUCCIONES DE USO (2318/2002)

3.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

3.1.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

3.2- PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, ULTRA FINO LUBRICADO CON SILICONA, LISOS, INCOLOROS CON RESERVORIO.

3.3- NO CORRESPONDE

3.6- PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

3.7- PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

3.8- LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE

a) Extrae el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos,

## 3 INSTRUCCIONES DE USO (2337/2002)

A) A PESAR DE QUE NINGÚN ANTICONCEPTIVO PUEDE GARANTIZAR EL 100% DE EFICACIA SI SON USADOS CORRECTAMENTE, LOS PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL SON:

1) UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL PLANEAMIENTO FAMILIAR.

2) AYUDAN A PREVENIR EL CONTAGIO Y LA TRANSMISIÓN DE SIDA Y ETS, TALES COMO: clamidia, herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis.

B) EXTRAE EL PRESERVATIVO DEL ENVASE INDIVIDUAL SÓLO CUANDO LO VAS A USAR, EVITANDO USAR ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas).

C) TENES QUE USARLO 1 SOLA VEZ Y REEMPLAZARLO EN CADA NUEVO ACTO SEXUAL.

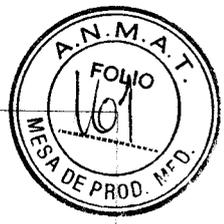
D) DESPUÉS DE USAR EL PRESERVATIVO NO LO TIRES AL INODORO, SINO AL CESTO DE RESIDUOS. NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS.

E) ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

Lic. FELIPE VILLALBA  
DIRECTOR  
KOPELCO S.A.

CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.

6573-



KOPELCO



ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

hebillas, uñas).

**b)** Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.

**c)** Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.

**d)** Después de usar el preservativo **NO LO TIRES AL INODORO**, sino al cesto de residuos.

No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

**3.9- NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES** (anillos, hebillas, uñas). **NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

**3.10 NO CORRESPONDE**

**3.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. CLAUDIO PAREJA M.N.10484 – M.P. —**

**3.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

**3.2 NO CORRESPONDE, 3.3 NO CORRESPONDE, 3.4 NO CORRESPONDE, 3.5 NO CORRESPONDE, 3.6 NO CORRESPONDE, 3.7 NO CORRESPONDE, 3.8 NO CORRESPONDE, 3.9 NO CORRESPONDE, 3.10 NO CORRESPONDE, 3.11 NO CORRESPONDE, 3.12 NO CORRESPONDE, 3.13 NO CORRESPONDE, 3.14 NO CORRESPONDE, 3.15 NO CORRESPONDE, 3.16 NO CORRESPONDE.**

*[Handwritten signature]*

LIC. FELIPE KOPELOWICZ  
DIRECTOR  
KOPELCO S.A.

*[Handwritten signature]*

CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.

6573



KOPELCO

ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

**2. RÓTULOS (2318/2002)**

**2.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**2.1.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**2.2 CONTIENE 1 PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, TÁNTRICO LUBRICADO CON SILICONA, TEXTURADO, INCOLOROS CON RESERVORIO.**

**2.3 NO CORRESPONDE**

**2.4 CÓDIGO/LOTE: XXXX.**

**2.5 FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**2.6 PRODUCTO DE UN SÓLO USO.**

**2.7 PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.**

**2.8 LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO**

- a) Extrae el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).
- b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.
- c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.
- d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos. No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

**2.9 NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

**2.10 NO CORRESPONDE**

Lic. FELIPE KOPELOWICZ  
DIRECTOR  
KOPELCO S.A.

**I- RÓTULOS (2337/2002) I-3-ENVASE PRIMARIO**

**A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL Marcas: TULIPÁN- GENTLEMAN- 4 UP by TULIPÁN-4U by TULIPÁN.**

**B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**C) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).**

**D) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA. PRODUCTO VENTA LIBRE.**

**E) 54 MM DE ANCHO NOMINAL.**

**F) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

**G) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE USO.**

**H) LUBRICADO CON SILICONA**

**I-4-ENVASE DE CONSUMO**

**I-4-1 CARA PRINCIPAL**

**A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL Marcas: TULIPÁN- GENTLEMAN- 4 UP by TULIPÁN-4U by TULIPÁN.**

**B) TEXTURADO, TÁNTRICO**

**C) CONTIENE 3, 4, 6 O 12 UNIDADES DE PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**D) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).**

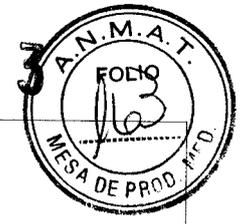
**I-4-2 OTRAS CARAS**

**A) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**A1) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000**

CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.

857



KOPELCO



**ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO**

**2.11 DIRECTOR TÉCNICO:** FARM. CLAUDIO PAREJA  
M.N.10484 – M.P. ----  
**2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO**  
**PM1105-19.**

PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA.  
IMPORTADOS , DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR  
**KOPELCO S.A.** HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN  
MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

**B) LOTE:** XXXX, **FECHA DE ELABORACIÓN:** MM/AAAA,  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 5 AÑOS A PARTIR DE LA  
FECHA DE FABRICACIÓN.

**C) NO FRACCIONAR.**

**D) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO**  
**PM1105-19.**

**E) DIRECTOR TÉCNICO:** FARM. CLAUDIO PAREJA  
M.N.10484 – M.P. ----

**F) PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, HUMEDAD  
Y DE LA LUZ.**

**G) ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 0800-777-0008.**

**H) PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL,  
LUBRICADOS CON SILICONA**

**I) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. Y LEA LAS  
INSTRUCCIONES DE USO.**

**3 INSTRUCCIONES DE USO (2318/2002)**

**3.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR  
INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA  
LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000  
PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA.  
IMPORTADOS , ACONDICIONADOS EN SU ENVASE  
SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR  
KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN  
MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**3.1.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR  
INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA  
LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000  
PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA.  
IMPORTADOS , DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR  
KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN  
MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**3.2- PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL,  
TÁNTRICO LUBRICADO CON SILICONA, TEXTURADO,  
INCOLOROS CON RESERVORIO.**

**3.3- NO CORRESPONDE**

**3.6- PRODUCTO DE UN SÓLO USO.**

**3.7-PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA  
HUMEDAD Y DE LA LUZ.**

**3.8- LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL  
INTERIOR DEL ENVASE.**

**a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando  
lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos,  
hebillas, uñas).**

Lic. FELIPE KOPELOWICZ  
DIRECTOR  
**KOPELCO S.A.**

**3 INSTRUCCIONES DE USO (2337/2002)**

**A) A PESAR DE QUE NINGÚN ANTICONCEPTIVO  
PUEDE GARANTIZAR EL 100% DE EFICACIA SI SON  
USADOS CORRECTAMENTE, LOS PRESERVATIVOS  
DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL SON:**

**1) UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL PLANEAMIENTO  
FAMILIAR.**

**2) AYUDAN A PREVENIR EL CONTAGIO Y LA  
TRANSMISIÓN DE SIDA Y ETS, TALES COMO: clamidia,  
herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B  
y sífilis.**

**B) EXTRAE EL PRESERVATIVO DEL ENVASE  
INDIVIDUAL SÓLO CUANDO LO VAS A USAR,  
EVITANDO USAR ELEMENTOS CORTANTES (anillos,  
hebillas, uñas).**

**C) TENES QUE USARLO 1 SOLA VEZ Y  
REEMPLAZARLO EN CADA NUEVO ACTO SEXUAL.**

**D) DESPUÉS DE USAR EL PRESERVATIVO NO LO  
TIRES AL INODORO, SINO AL CESTO DE RESIDUOS.  
NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE,  
COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS.**

**E) ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA,  
CONSULTA A TU MÉDICO.**

CLAUDIO PAREJA  
FARMACEÚTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
**KOPELCO S.A.**



KOPELCO



ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

- b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.
- c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.
- d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos.

No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

**3.9- NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

**3.10 NO CORRESPONDE**

**3.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. CLAUDIO PAREJA M.N. 10484 – M.P. —**

**3.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

- 3.2 NO CORRESPONDE, 3.3 NO CORRESPONDE,**
- 3.4 NO CORRESPONDE, 3.5 NO CORRESPONDE,**
- 3.6 NO CORRESPONDE, 3.7 NO CORRESPONDE,**
- 3.8 NO CORRESPONDE, 3.9 NO CORRESPONDE,**
- 3.10 NO CORRESPONDE, 3.11 NO CORRESPONDE,**
- 3.12 NO CORRESPONDE, 3.13 NO CORRESPONDE,**
- 3.14 NO CORRESPONDE, 3.15 NO CORRESPONDE,**
- 3.16 NO CORRESPONDE**

E

**LIC. FELIPE KOPELCOVICH  
DIRECTOR  
KOPELCO S.A.**

**CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.**

6573



KOPELCO

## ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

## 2. RÓTULOS (2318/2002)

2.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR **INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

2.1.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR **INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

2.2 CONTIENE 1 PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, **TACHAS** LUBRICADO CON SILICONA, CON TACHAS, INCOLOROS CON RESERVORIO.

2.3 NO CORRESPONDE

2.4 CÓDIGO/LOTE: XXXX.

2.5 FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

2.6 PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

2.7 PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

2.8 LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO

a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).

b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.

c) Después de la eyacuación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.

d) Después de usar el preservativo **NO LO TIRES AL INODORO**, sino al cesto de residuos.

No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

2.9 **NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES** (anillos, hebillas, uñas). **NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE**, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS, ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

2.10 NO CORRESPONDE

LIC. FELIPE KOPELOWICZ  
DIRECTOR  
KOPELCO S.A.

## I- RÓTULOS (2337/2002)

## I-3-ENVASE PRIMARIO

A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL  
Marcas: **TULIPÁN- GENTLEMAN- 4 UP by TULIPÁN-4U by TULIPÁN.**

B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

C) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).

D) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR **INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.  
PRODUCTO VENTA LIBRE.

E)  $52 \pm 2$  MM DE ANCHO NOMINAL.

F) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO **PM1105-19.**

G) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE USO.

H) LUBRICADO CON SILICONA

## I-4-ENVASE DE CONSUMO

## I-4-1 CARA PRINCIPAL

A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL  
Marcas: **TULIPÁN- GENTLEMAN- 4 UP by TULIPÁN-4U by TULIPÁN.**

B) CON TACHAS, **TACHAS**

C) CONTIENE 3, 4, 6 O 12 UNIDADES DE PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

D) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).

## I-4-2 OTRAS CARAS

A) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR **INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

A1) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR

CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.

KOPELCO

## ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

**2.11 DIRECTOR TÉCNICO:** FARM. CLAUDIO PAREJA  
M.N. 10484 – M.P. ———

**2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO**  
**PM1105-19.**

**INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

**B) LOTE:** XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

**C) NO FRACCIONAR.**

**D) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO**  
**PM1105-19.**

**E) DIRECTOR TÉCNICO:** FARM. CLAUDIO PAREJA  
M.N. 10484 – M.P. ———

**F) PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, HUMEDAD Y DE LA LUZ.**

**G) ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 0800-777-0008.**

**H) PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, LUBRICADOS CON SILICONA**

**I) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. Y LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

**3 INSTRUCCIONES DE USO (2318/2002)**

**3.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

**3.1.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

**3.2- PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, TACHAS LUBRICADO CON SILICONA, CON TACHAS, INCOLOROS CON RESERVORIO.**

**3.3- NO CORRESPONDE**

**3.6- PRODUCTO DE UN SÓLO USO.**

**3.7- PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.**

**3.8- LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE**

Lic. FELIPE KOPELOWICZ  
DIRECTOR  
**KOPELCO S.A.**

**3 INSTRUCCIONES DE USO (2337/2002)**

**A) A PESAR DE QUE NINGÚN ANTICONCEPTIVO PUEDE GARANTIZAR EL 100% DE EFICACIA SI SON USADOS CORRECTAMENTE, LOS PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL SON:**

1) UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL PLANEAMIENTO FAMILIAR.

2) AYUDAN A PREVENIR EL CONTAGIO Y LA TRANSMISIÓN DE SIDA Y ETS, TALES COMO: clamidia, herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis.

**B) EXTRAER EL PRESERVATIVO DEL ENVASE INDIVIDUAL SÓLO CUANDO LO VAS A USAR, EVITANDO USAR ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas).**

**C) TENES QUE USARLO 1 SOLA VEZ Y REEMPLAZARLO EN CADA NUEVO ACTO SEXUAL.**

**D) DESPUÉS DE USAR EL PRESERVATIVO NO LO TIRES AL INODORO, SINO AL CESTO DE RESIDUOS. NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS.**

**E) ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
**KOPELCO S.A.**

657.13



KOPELCO



ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

- a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).
- b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.
- c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.
- d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos.

No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

**3.9- NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

**3.10 NO CORRESPONDE**

**3.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. CLAUDIO PAREJA M.N.10484 - M.P. —**

**3.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

- 3.2 NO CORRESPONDE, 3.3 NO CORRESPONDE,**
- 3.4 NO CORRESPONDE, 3.5 NO CORRESPONDE,**
- 3.6 NO CORRESPONDE, 3.7 NO CORRESPONDE,**
- 3.8 NO CORRESPONDE, 3.9 NO CORRESPONDE,**
- 3.10 NO CORRESPONDE, 3.11 NO CORRESPONDE,**
- 3.12 NO CORRESPONDE, 3.13 NO CORRESPONDE,**
- 3.14 NO CORRESPONDE, 3.15 NO CORRESPONDE,**
- 3.16 NO CORRESPONDE.**

Lic. FELIPE KOPELCOVICZ  
DIRECTOR  
KOPELCO S.A.

CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.

KOPELCO

ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

**2. RÓTULOS (2318/2002)**

**2.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

**2.1.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

**2.2 CONTIENE 1 PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, SÚPER FINO LUBRICADO CON SILICONA, LISOS, INCOLOROS CON RESERVORIO.**

**2.3 NO CORRESPONDE**

**2.4 CÓDIGO/LOTE: XXXX.**

**2.5 FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**2.6 PRODUCTO DE UN SÓLO USO.**

**2.7 PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.**

**2.8 LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO**

**a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).**

**b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.**

**c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.**

**d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos.**

No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

**2.9 NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

**2.10 NO CORRESPONDE**

**2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. CLAUDIO PAREJA**  
M.N.10484 – M.P. —

Lic. FARM. CLAUDIO PAREJA  
DIRECTOR

KOPELCO S.A.

**I- RÓTULOS (2337/2002)****I-3-ENVASE PRIMARIO**

**A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL**  
Marcas: TULIPÁN- GENTLEMAN- 4 UP by TULIPÁN- 4U by TULIPÁN.

**B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**C) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).**

**D) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.  
PRODUCTO VENTA LIBRE.

**E) 52 ± 2 MM DE ANCHO NOMINAL.**

**F) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

**G) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE USO.**

**H) LUBRICADO CON SILICONA**

**I-4-ENVASE DE CONSUMO****I-4-1 CARA PRINCIPAL**

**A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL**  
Marcas: TULIPÁN- GENTLEMAN- 4 UP by TULIPÁN- 4U by TULIPÁN.

**B) LISOS, SÚPER FINO**

**C) CONTIENE 3, 4, 6 O 12 UNIDADES DE PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**D) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).**

**I-4-2 OTRAS CARAS**

**A) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. B1650HBC SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

**A1) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD.** LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR

CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.



**2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

**KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**C) NO FRACCIONAR.**

**D) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

**E) DIRECTOR TÉCNICO: FARM. CLAUDIO PAREJA M.N. 10484 – M.P. —**

**F) PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, HUMEDAD Y DE LA LUZ.**

**G) ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 0800-777-0008.**

**H) PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, LUBRICADOS CON SILICONA**

**I) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. Y LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

**3 INSTRUCCIONES DE USO (2318/2002)**

**3.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. B1650HBC SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**3.1.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**3.2- PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, SÚPER FINO LUBRICADO CON SILICONA, LISOS, INCOLOROS CON RESERVORIO.**

**3.3- NO CORRESPONDE**

**3.6- PRODUCTO DE UN SÓLO USO.**

**3.7-PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.**

**3.8- LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE.**

**a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).**

**b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.**

**c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes**

Lic. FELIXE KOPELWICZ  
DIRECTOR

KOPELCO S.A.

**3 INSTRUCCIONES DE USO (2337/2002)**

**A) A PESAR DE QUE NINGÚN ANTICONCEPTIVO PUEDE GARANTIZAR EL 100% DE EFICACIA SI SON USADOS CORRECTAMENTE, LOS PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL SON:**

**1) UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL PLANEAMIENTO FAMILIAR.**

**2) AYUDAN A PREVENIR EL CONTAGIO Y LA TRANSMISIÓN DE SIDA Y ETS, TALES COMO: clamidia, herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis.**

**B) EXTRAE EL PRESERVATIVO DEL ENVASE INDIVIDUAL SÓLO CUANDO LO VAS A USAR, EVITANDO USAR ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas).**

**C) TENES QUE USARLO 1 SOLA VEZ Y REEMPLAZARLO EN CADA NUEVO ACTO SEXUAL.**

**D) DESPUÉS DE USAR EL PRESERVATIVO NO LO TIRES AL INODORO, SINO AL CESTO DE RESIDUOS. NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS.**

**E) ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484

DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.

0573



KOPELCO



ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.

d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos.  
No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

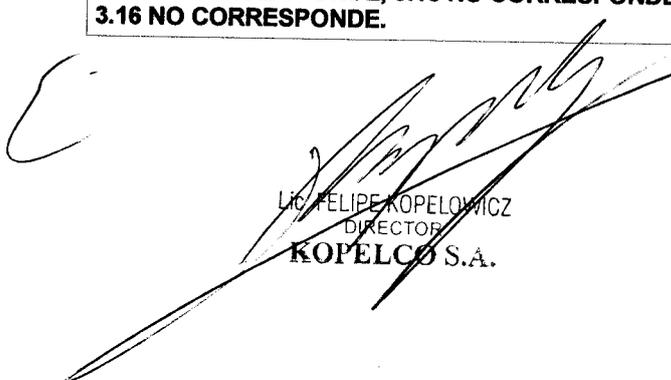
**2.9- NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

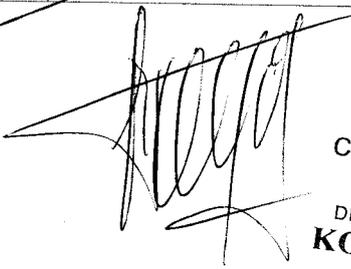
**2.10 NO CORRESPONDE**

**2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. CLAUDIO PAREJA M.N. 10484 – M.P. —**

**2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

**3.2 NO CORRESPONDE, 3.3 NO CORRESPONDE, 3.4 NO CORRESPONDE, 3.5 NO CORRESPONDE, 3.6 NO CORRESPONDE, 3.7 NO CORRESPONDE, 3.8 NO CORRESPONDE, 3.9 NO CORRESPONDE, 3.10 NO CORRESPONDE, 3.11 NO CORRESPONDE, 3.12 NO CORRESPONDE, 3.13 NO CORRESPONDE, 3.14 NO CORRESPONDE, 3.15 NO CORRESPONDE, 3.16 NO CORRESPONDE.**

  
LIC. FELIPE KOPELOWICZ  
DIRECTOR  
KOPELCO S.A.

  
CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.



KOPELCO

## ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

**2. RÓTULOS (2318/2002)**

**2.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**2.1.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**2.2 CONTIENE 1 PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, DOBLE PLACER LUBRICADO CON SILICONA, TEXTURADO MÁS TACHAS, INCOLOROS CON RESERVORIO.**

**2.3 NO CORRESPONDE**

**2.4 CÓDIGO/LOTE: XXXX.**

**2.5 FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**2.6 PRODUCTO DE UN SÓLO USO.**

**2.7 PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.**

**2.8 LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO**

a) Extrae el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).

b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.

c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.

d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos.

No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

**2.9 NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

**2.10 NO CORRESPONDE**

Lic. FELIPE KOPELOWICZ

DIRECTOR

KOPELCO S.A.

**I- RÓTULOS (2337/2002) I-3-ENVASE PRIMARIO**

**A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL**  
Marcas: **TULIPÁN- GENTLEMAN- 4 UP by TULIPÁN-4U by TULIPÁN.**

**B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**C) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).**

**D) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA. PRODUCTO VENTA LIBRE.**

**E) 52 ± 2 MM DE ANCHO NOMINAL.**

**F) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

**G) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE USO.**

**H) LUBRICADO CON SILICONA**

**I-4-ENVASE DE CONSUMO****I-4-1 CARA PRINCIPAL**

**A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL**  
Marcas: **TULIPÁN- GENTLEMAN- 4 UP by TULIPÁN-4U by TULIPÁN.**

**B) TEXTURADO MAS TACHAS, DOBLE PLACER**

**C) CONTIENE 3, 4, 6 O 12 UNIDADES DE PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**D) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).**

**I-4-2 OTRAS CARAS**

**A) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**A1) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA**

CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.

657



KOPELCO



ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. CLAUDIO PAREJA M.N.10484 – M.P. —

2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.

LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

C) NO FRACCIONAR.

D) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.

E) DIRECTOR TÉCNICO: FARM. CLAUDIO PAREJA M.N.10484 – M.P. —

F) PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, HUMEDAD Y DE LA LUZ.

G) ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 0800-777-0008.

H) PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, LUBRICADOS CON SILICONA.

I) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. Y LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

3 INSTRUCCIONES DE USO (2318/2002)

3.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

3.1.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

3.2- PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, DOBLE PLACER LUBRICADO CON SILICONA, TEXTURADO MÁS TACHAS, INCOLOROS CON RESERVORIO.

3.3- NO CORRESPONDE

3.6- PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

3.7-PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

3.8- LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE.

a) Extrae el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).

b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el

3 INSTRUCCIONES DE USO (2337/2002)

A) A PESAR DE QUE NINGÚN ANTICONCEPTIVO PUEDE GARANTIZAR EL 100% DE EFICACIA SI SON USADOS CORRECTAMENTE, LOS PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL SON:

1) UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL PLANEAMIENTO FAMILIAR.

2) AYUDAN A PREVENIR EL CONTAGIO Y LA TRANSMISIÓN DE SIDA Y ETS, TALES COMO: clamidia, herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis.

B) EXTRAE EL PRESERVATIVO DEL ENVASE INDIVIDUAL SÓLO CUANDO LO VAS A USAR, EVITANDO USAR ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas).

C) TENES QUE USARLO 1 SOLA VEZ Y REEMPLAZARLO EN CADA NUEVO ACTO SEXUAL.

D) DESPUÉS DE USAR EL PRESERVATIVO NO LO TIRES AL INODORO, SINO AL CESTO DE RESIDUOS. NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS.

E) ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

Lic. FOLIO 717/22

DIRECTOR

KOPELCO S.A.

CLAUDIO PAREJA FARMACÉUTICO M.N. 10484

DIRECTOR TÉCNICO

KOPELCO S.A.

8573



KOPELCO



ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

índice para eliminar el aire y desenrollalo.  
 c) Después de la eyaculación retirará el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.  
 d) Después de usar el preservativo **NO LO TIRES AL INODORO**, sino al cesto de residuos.  
 No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

**3.9- NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

**3.10 NO CORRESPONDE**

**3.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. CLAUDIO PAREJA M.N. 10484 – M.P. —**

**3.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

**3.2 NO CORRESPONDE, 3.3 NO CORRESPONDE, 3.4 NO CORRESPONDE, 3.5 NO CORRESPONDE, 3.6 NO CORRESPONDE, 3.7 NO CORRESPONDE, 3.8 NO CORRESPONDE, 3.9 NO CORRESPONDE, 3.10 NO CORRESPONDE, 3.11 NO CORRESPONDE, 3.12 NO CORRESPONDE, 3.13 NO CORRESPONDE, 3.14 NO CORRESPONDE, 3.15 NO CORRESPONDE, 3.16 NO CORRESPONDE.**

E

*[Signature]*  
 LUIS FELIPE KOPELCO  
 DIRECTOR  
 KOPELCO S.A.

*[Signature]*  
 CLAUDIO PAREJA  
 FARMACÉUTICO  
 M.N. 10484  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 KOPELCO S.A.



KOPELCO

## ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

**2. RÓTULOS (2318/2002)**

**2.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**2.1.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**2.2 CONTIENE 1 PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, CLÁSICO LUBRICADO CON SILICONA, LISOS, INCOLOROS CON RESERVORIO.**

**2.3 NO CORRESPONDE**

**2.4 CÓDIGO/LOTE: XXXX.**

**2.5 FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**2.6 PRODUCTO DE UN SÓLO USO.**

**2.7 PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.**

**2.8 LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO**

**a) Extrae el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).**

**b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.**

**c) Después de la eyacuación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.**

**d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos. No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.**

**2.9 NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

**2.10 NO CORRESPONDE**

**2.11 DIRECTOR TÉCNICO FARM. CLAUDIO PAREJA M.N.10484 – M.P.**

Lic. FELIPE KOPELWICZ  
DIRECTOR  
KOPELCO S.A.

**I- RÓTULOS (2337/2002) I-3-ENVASE PRIMARIO**

**A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL  
Marcas: TULIPÁN- GENTLEMAN- 4 UP by TULIPÁN-4U by TULIPÁN.**

**B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**C) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).**

**D) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA. PRODUCTO VENTA LIBRE.**

**E) 52 ± 2 MM DE ANCHO NOMINAL.**

**F) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

**G) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE USO.**

**H) LUBRICADO CON SILICONA**

**I-4-ENVASE DE CONSUMO****I-4-1 CARA PRINCIPAL**

**A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL  
Marca: TULIPÁN-GENTLEMAN - 4 UP by TULIPÁN-4 U by TULIPÁN.**

**B) LISOS, CLÁSICO**

**C) CONTIENE 3, 4, 6 O 12 UNIDADES DE PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**D) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).**

**I-4-2 OTRAS CARAS**

**A) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**A1) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA**

CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.



KOPELCO

## ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

**2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

**B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**C) NO FRACCIONAR.**

**D) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

**E) DIRECTOR TÉCNICO: FARM. CLAUDIO PAREJA M.N.10484 – M.P. —**

**F) PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, HUMEDAD Y DE LA LUZ.**

**G) ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 0800-777-0008.**

**H) PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, LUBRICADOS CON SILICONA**

**I) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. Y LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

**3 INSTRUCCIONES DE USO (2318/2002)**

**3.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**3.1.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR INNOLATEX SDN. BHD. LOT 594, PERSIARAN RAJA LUMU, PANDANARAN INDUSTRIAL ESTATE, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALASIA. IMPORTADOS, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. HEREDIA 1147/55/61 (B1650HBC) SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.**

**3.2- PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, CLÁSICO LUBRICADO CON SILICONA, LISOS, INCOLOROS CON RESERVORIO.**

**3.3- NO CORRESPONDE**

**3.6- PRODUCTO DE UN SÓLO USO.**

**3.7-PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.**

**3.8- LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE.**

**a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).**

**b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desarrollarlo.**

Lic. FELIPE KOPELWICZ  
DIRECTOR  
KOPELCO S.A.

**3 INSTRUCCIONES DE USO (2337/2002)**

**A) A PESAR DE QUE NINGÚN ANTICONCEPTIVO PUEDE GARANTIZAR EL 100% DE EFICACIA SI SON USADOS CORRECTAMENTE, LOS PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL SON:**

**1) UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL PLANEAMIENTO FAMILIAR.**

**2) AYUDAN A PREVENIR EL CONTAGIO Y LA TRANSMISIÓN DE SIDA Y ETS, TALES COMO: clamidia, herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis.**

**B) EXTRAE EL PRESERVATIVO DEL ENVASE INDIVIDUAL SÓLO CUANDO LO VAS A USAR, EVITANDO USAR ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas).**

**C) TENES QUE USARLO 1 SOLA VEZ Y REEMPLAZARLO EN CADA NUEVO ACTO SEXUAL.**

**D) DESPUÉS DE USAR EL PRESERVATIVO NO LO TIRES AL INODORO, SINO AL CESTO DE RESIDUOS. NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS.**

**E) ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

CLAUDIO PAREJA  
FARMAGÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.



KOPELCO



ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

c) Después de la eyaculación retirará el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.

d) Después de usar el preservativo **NO LO TIRES AL INODORO**, sino al cesto de residuos.  
No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

**3.9- NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.**

**3.10 NO CORRESPONDE**

**3.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. CLAUDIO PAREJA M.N.10484 – M.P. ———**

**3.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-19.**

**3.2 NO CORRESPONDE, 3.3 NO CORRESPONDE, 3.4 NO CORRESPONDE, 3.5 NO CORRESPONDE, 3.6 NO CORRESPONDE, 3.7 NO CORRESPONDE, 3.8 NO CORRESPONDE, 3.9 NO CORRESPONDE, 3.10 NO CORRESPONDE, 3.11 NO CORRESPONDE, 3.12 NO CORRESPONDE, 3.13 NO CORRESPONDE, 3.14 NO CORRESPONDE, 3.15 NO CORRESPONDE, 3.16 NO CORRESPONDE.**

Lic. FELIPE KOTÉ CWINOZ  
DIRECTOR  
KOPELCO S.A.

CLAUDIO PAREJA  
FARMACÉUTICO  
M.N. 10484  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.