



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° **6956**

BUENOS AIRES, **23 JUN 2017**

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-02367-16-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones MARMEDICAL S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN Nº **6956**

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca WELFARE MEDICAL, nombre descriptivo CLIPS DE POLIMERO Y APLICADORES y nombre técnico PINZAS, DE OTRO TIPO, de acuerdo con lo solicitado por MARMEDICAL S.A, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas de 114 a 115 y de fojas 123 a 133 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-1507-9, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN Nº 6956

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.


Expediente Nº 1-47-3110-02367-16-4

DISPOSICIÓN Nº

6956

MD

Dr. ROBERTO LEGG
Subadministrador Nacional
ANMAT

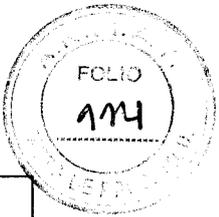

Clips de polímero y aplicadores

PROYECTO DE RÓTULO (ANEXO III-B)

5 8 5 6

23 JUN 2017

Importado y distribuido por:

Marmedical S.A.

Mariano Moreno 1335, La Lucila, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Fabricado por:

Welfare Medical Ltd.

Pure offices, Tachbrook Park, Warwick, CV34 6WE, Reino Unido

Clips de polímero y aplicadores

Welfare Medical

Modelo: _____

Ref# _____ **LOT** xxxxxx  _____  _____



STERILE EO



NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ ABIERTO O DAÑADO

ALMACENAR EN LUGAR SECO Y FRESCO PROTEGIDO CONTRA LA LUZ SOLAR DIRECTA

Director Técnico: *Farm. Costanzo Ricardo Felipe - MP N° 17.268*

Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Autorizado por la ANMAT PM-1507-9

E

MARMEDICAL S.A.
MARIANO N. PEREZ
PRESIDENTE

COSTANZO RICARDO FELIPE
FARMACEUTICO
MN. 11037 MP. 17268
DIR. TEC. MARMEDICAL S.A.

6956:



MARMEDICAL

Clips de polímero y aplicadores

PROYECTO DE RÓTULO (ANEXO III-B)

Importado y distribuido por:

Marmedical S.A.

Mariano Moreno 1335, La Lucila, Vicente
López, Provincia de Buenos Aires,
Argentina.

Fabricado por:

Welfare Medical Ltd.

Pure offices, Tachbrook Park, Warwick,
CV34 6WE, Reino Unido

Clips de polímero y aplicadores

Welfare Medical

Aplicadores reutilizables REF# _____

Fecha Fab: ___/___/___ Lote: _____ Esterilizar antes de usar.



**SE RECOMIENDA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON CICLO DE PRE VACIO
DURANTE 4 MIN A 131 - 134 °C**

Director Técnico: *Farm. Costanzo Ricardo Felipe - MP N° 17.268*

Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Autorizado por la ANMAT PM-1507-9

Σ

MARMEDICAL S.A.
MARIANO N. PEREZ
PRESIDENTE

COSTANZO RICARDO FELIPE
FARMACEUTICO
MN: 11037 MP 17268
DIR. TEC MARMEDICAL S.A.

6956



MARMEDICAL

Clips de polímero y aplicadores

INTRUCCIONES DE USO (ANEXO III-B)

Importado y distribuido por:

Marmedical S.A.

Mariano Moreno 1335, La Lucila, Vicente
López, Provincia de Buenos Aires,
Argentina.

Fabricado por:

Welfare Medical Ltd.

Pure offices, Tachbrook Park, Warwick,
CV34 6WE, Reino Unido

Clips de polímero y aplicadores

Welfare Medical

Modelo: _____



NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ ABIERTO O DAÑADO

ALMACENAR EN LUGAR SECO Y FRESCO PROTEGIDO CONTRA LA LUZ SOLAR DIRECTA

Director Técnico: *Farm. Costanzo Ricardo Felipe - MP N° 17.268*

Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.


Autorizado por la ANMAT PM-1507-9

E

COSTANZO RICARDO FELIPE
FARMACEUTICO
MN 11037 MP 17268
DIR. TEC. MARMEDICAL S.A.

MARMEDICAL S.A.
MARTANON. PEREZ
PRESIDENTE

6956

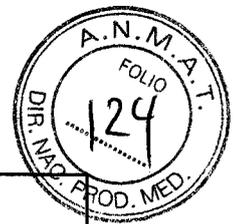

MARMEDICAL

Clips de polímero y aplicadores

INTRUCCIONES DE USO (ANEXO III-B)

Importado y distribuido por:

Marmedical S.A.

Mariano Moreno 1335, La Lucila, Vicente
López, Provincia de Buenos Aires,
Argentina.

Fabricado por:

Welfare Medical Ltd.

Pure offices, Tachbrook Park, Warwick,
CV34 6WE, Reino Unido

Clips de polímero y aplicadores

Welfare Medical

Aplicadores reutilizables REF# _____



Esterilizar antes de usar.

**SE RECOMIENDA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON CICLO DE PRE VACIO
DURANTE 4 MIN A 131 – 134 °C**

Director Técnico: *Farm. Costanzo Ricardo Felipe - MP N° 17.268*

Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Autorizado por la ANMAT PM-1507-9

USO PREVISTO:

Los clips de polímero están indicados para marcar y/o ligar cualquier estructura tisular o vasos durante una operación donde se requiera clips no absorbibles, sobre todo en cirugía general, colorectal, urología y ginecología.

CONTRAINDICACIÓN:

No utilizar para ligación tubaria como método contraceptivo

No utilizar para ligar la arteria renal durante procedimiento laparoscópico de nefrectomía de donante

No utilizar en contacto con el Sistema Nervioso, Sistema cardiovascular ni Sistema Circulatorio Central.

MARMEDICAL S.A.
MARIANO N. PEREZ
PRESIDENTE

COSTANZO RICARDO FELIPE
FARMACEUTICO
MP 17268
DIR. TEC MARMEDICAL S.A.



MARMEDICAL

Clips de polímero y aplicadores

INTRUCCIONES DE USO (ANEXO III-B)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- Los clips son de uso único. no utilizar si el envase está abierto o dañado.
- Este producto sólo debe ser utilizado por personal médico entrenado y calificado. El uso del producto debe estar basado en el entrenamiento clínico del cirujano, quien es completamente responsable de la elección del tamaño de clip apropiado y de determinar la cantidad de clips a aplicar para lograr hemostasis.
- Los aplicadores sólo pueden utilizarse para colocar los clips de polímero de Welfare Medical.
- Asegúrese de que el tamaño del clip es apropiado para la estructura a ligar
- Los tamaños de estructura a ligar recomendados son:
 - Tamaño del clip – Tamaño del vaso
 - Mediano/grande – 3 a 10 mm
 - Grande – 5 a 13 mm
 - Extra grande – 7 a 16 mm
- Luego de colocar cada clip se debe cerrar completamente el aplicador
- Asegúrese de que cada clip ha sido correctamente colocado y completamente cerrado en la estructura ligada.
- No presione el aplicador sobre otros instrumentos quirúrgicos
- No utilice aplicadores dañados.
- Los siguientes factores poseen serias influencias sobre el cerrado de los clips: condición del aplicador, fuerza utilizada por el cirujano para cerrar el clip, tamaño de la estructura ligada y características del propio clip

MARMEDICAL S.A.
 MARIANO N. PEREZ
 PRESIDENTE

COSTANZO RICARDO FEMPE
 FARMACEUTICO
 MN 1037 MB 17268
 DIR. TEC. MARMEDICAL S.A.



MARMEDICAL

Clips de polímero y aplicadores

INTRUCCIONES DE USO (ANEXO III-B)

- Elimine todos los instrumentos y accesorios abierto, usados o no usados.

Cuidado, limpieza y esterilización de aplicadores reutilizables:

Las mordazas del aplicador son delicadas pueden dañarse fácilmente. La mala manipulación de los aplicadores puede resultar en carga o cierre inapropiados de los clips. El cuidado, limpieza y mantenimiento son importantes para asegurar el buen funcionamiento. Todos los aplicadores reutilizables fabricados por Welfare Medical son provistos no estériles. Los mismos deben ser limpiados y esterilizados antes de cada uso de acuerdo a la práctica de cada hospital. Los aplicadores de clips endoscópicos no requieren ser desensamblados para su limpieza y esterilización pero el mecanismo interno de la vaina debe ser cuidadosamente limpiado usando el canal para enjuague. Se recomienda la esterilización por vapor con ciclo de pre vacío durante 4 min a 131 – 134 °C.

INTRUCCIONES DE USO:

- Verifique la compatibilidad de todos los dispositivos antes del uso
- Quite el cartucho de clips del envoltorio utilizado técnica aséptica y coloque sobre una superficie estéril
- Seleccione el tamaño de clip apropiado y aplicador compatible
- Inserte un clip en el aplicador. Para ello inserte las puntas del aplicador en el cartucho y perpendiculares al mismo. Presione suavemente el aplicador sobre el clip hasta oír un click. Retire el aplicador del cartucho asegurándose de que el clip esté bien sujeto. (Fig 1)
- Coloque el clip alrededor de la estructura que pretende ligar o marcar. Cierre el clip usando la fuerza apropiada con un movimiento firme, suave y continuo. Durante la aplicación oriente el clip como se

MARMEDICAL S.A.
 MARIANO N. PEREZ.
 PRESIDENTE

COSTANZO RICARDO FELIPE
 FARMACEUTICO
 MY 11087 MP 17268
 DIR. TEC. MARMEDICAL S.A.



Clips de polímero y aplicadores

INTRUCCIONES DE USO (ANEXO III-B)

muestra en la figura 1. Posicione el clip alrededor del tejido que desea ligar de modo de visualizar claramente el mecanismo de bloqueo (Fig 2). Presione hasta cerrar el clip (Fig 3). Deje 2 -3 mm de tejido libre alrededor del clip y no utilice el borde del clip como guía de corte (Fig 4)

- Remueva el aplicador del sitio quirúrgico.

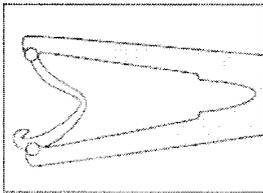


Fig 1

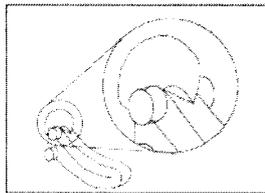


Fig 2

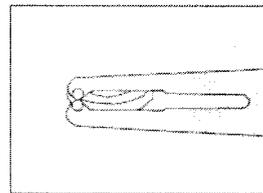


Fig 3

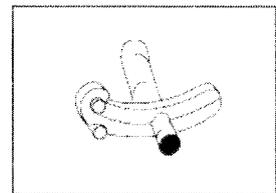


Fig 4

ALMACENAMIENTO:

Este instrumento debe ser almacenado en un lugar seco y lejos de temperaturas extremas.

Aplicar el cuidado que deben adoptarse para mantener las condiciones de envoltorios estériles. No doble el envoltorio del producto. Verifique la fecha de Esterilización del producto; si ha caducado, no utilice.

PRESENTACIÓN:

Los clips se presentan estériles mediante con óxido de etileno.

Los aplicadores reutilizables se presentan no estériles.

MARMEDICAL S.A.
MARIANO N. PEREZ
PRESIDENTE

COSTANZO RICARDO FELIPE
FARMACEUTICO
MX-11037-MR-17268
CIR TEC MARMEDICAL S.A.


 MARMEDICAL	Clips de polímero y aplicadores INFORME TÉCNICO (ANEXO III-C)
--	--

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MÉDICO

Los clips de Polímero están indicados para ligar cualquier estructura tisular o vasos durante una operación donde se requiera clips no absorbibles. Deben ser colocados utilizando un aplicador especialmente diseñado para tal fin.

No se deben utilizar para ligación tubaria como método contraceptivo ni utilizar para ligar la arteria renal durante procedimiento laparoscópico de nefrectomía de donante.

Clips de Polímero

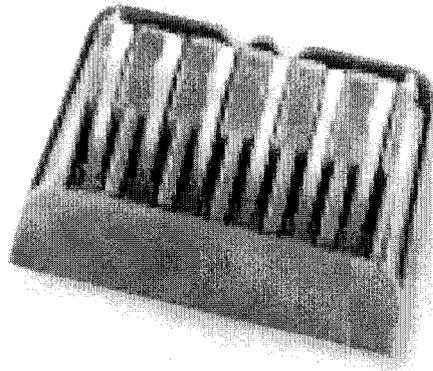

Cartucho con Clips de polímero

Código	Tamaño	rango	color	Cant de clips Por cartucho	Cant de cartuchos por caja
WM-PC230	Medio-grande	3 – 10 mm	verde	6	14
WM-PC240	Grande	5 – 13 mm	púrpura	6	14
WM-PC250	Extra grande	7 – 16 mm	amarillo	6	14

Material de fabricación: Acetal (Polyoxymethylene – POM-), no tóxico, inerte, permanente no absorbible y radiopaco.

MARMEDICAL S.A.
 MARIAN N. PEREZ
 PRESIDENTE


COSTANZO RICARDO FELIPE
 FARMACEUTICO
 MN. 11037 MP 17268
 DIR. TEC. MARMEDICAL S.A.




Clips de polímero y aplicadores

INFORME TÉCNICO (ANEXO III-C)

Aplicadores de Clips

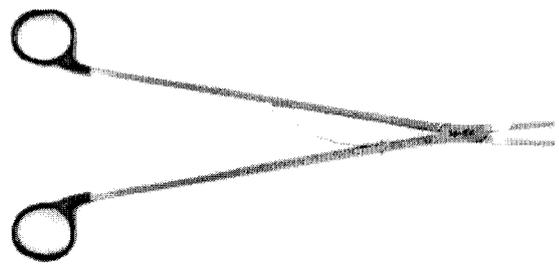

Aplicadores abiertos reutilizables

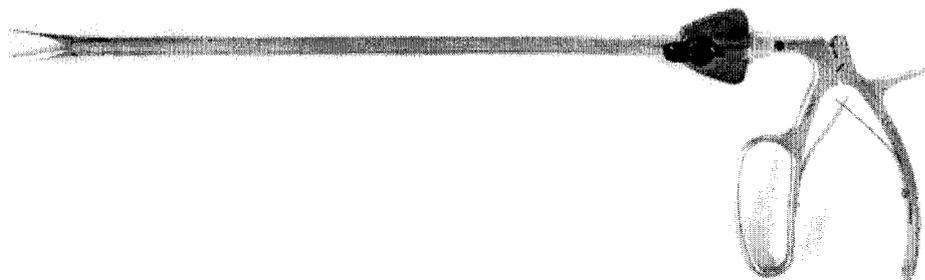

Aplicadores endoscópicos reutilizables


Código	Descripción	Tamaño de clip
WM-PC25ML	Aplicador abierto de clips de polímero	medio-grande
WM-PC25L	Aplicador abierto de clips de polímero	grande
WM-PC25EL	Aplicador abierto de clips de polímero	extra grande
WM-PC205ML	Aplicador endoscópico de clips de polímero	mediano-grande
WM-PC205L	Aplicador endoscópico de clips de polímero	grande
WM-PC205EL	Aplicador endoscópico de clips de polímero	extra grande

Material de fabricación de aplicadores: Acero inoxidable 316L.

MARMEDICAL S.A.
 MARIANO A. PEREZ
 PRESIDENTE

COSTANZO RICARDO FELIPE
 FARMACEUTICO
 MN. 11037 MP 17268
 DIR. TEC. MARMEDICAL S.A.

6956

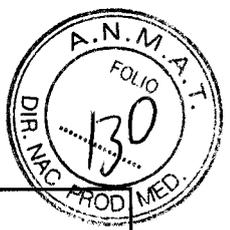

 MARMEDICAL	<h2>Clips de polímero y aplicadores</h2> <p>INFORME TÉCNICO (ANEXO III-C)</p>
---	---

Los aplicadores son todos no estériles y reutilizables.

Los aplicadores y los cartuchos de clips están identificados por color según el código para una fácil identificación.

La medida Medium-Large (Cartucho Verde) – Apto para ligar vasos de 3 mm a 10 mm

La medida Large (Cartucho color Violeta) – Apto para ligar vasos de 5 a 13 mm

La medida Extra-Large (Cartucho color amarillo) – Apto para ligar vasos de 7 a 16 mm

1.2 USO PREVISTO:

Los clips de polímero están indicados para marcar y/o ligar cualquier estructura tisular o vasos durante una operación donde se requiera clips no absorbibles, sobre todo en cirugía general, colorectal, urología y ginecología.

Algunos Usos Quirúrgicos:

- Colorectal, resección de Colon
- Colecistotomías: arteria y conducto cístico
- Prostatectomía: abierta o laparoscópica.
- Gastrectomía: uso en curvatura mayor y menor.
- Esplenectomía: ligadura de la arteria esplénica.
- Apendicetomía.
- Pancreatectomía.

MARMEDICAL S.A.
MARIANO N. PEREZ
PRESIDENTE

COSTANZO RICARDO FELIPE
FARMACEUTICO
MN. 11037 MP 17268
DIR. TEC. MARMEDICAL S.A.

 MARMEDICAL	Clips de polímero y aplicadores INFORME TÉCNICO (ANEXO III-C)
--	--

- Cistectomía
- Fondo aplicación de Nissen

CONTRAINDICACIÓN:

No utilizar para ligación tubaria como método contraceptivo

No utilizar para ligar la arteria renal durante procedimiento laparoscópico de nefrectomía de donante

No utilizar en contacto con el Sistema Nervioso, Sistema cardiovascular ni Sistema Circulatorio Central.

CLASIFICACION DE RIESGO

Tipo de producto: Tipo de producto: quirúrgicamente invasivo, implantable. No reabsorbible. Sin contacto con el Sistema Nervioso, Sistema cardiovascular ni Sistema Circulatorio Central.

Clasificación de riesgo: Producto clase III (Regla N° 8 Anexo II Disp. 2318-02)

1.3 PRECAUCIONES, RESTRICCIONES, ADVERTENCIAS, CUIDADOS ESPECIALES Y ACLARACIONES SOBRE EL USO DEL PRODUCTO MÉDICO, COMO SU ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE;

Ciclo de Vida del Producto en almacenamiento (Shelf Life):

3 (tres) años a partir de la fecha de fabricación

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- Los clips son de uso único. no utilizar si el envase está abierto o dañado.



MARMEDICAL

Clips de polímero y aplicadores

INFORME TÉCNICO (ANEXO III-C)

- Este producto sólo debe ser utilizado por personal médico entrenado y calificado. El uso del producto debe estar basado en el entrenamiento clínico del cirujano, quien es completamente responsable de la elección del tamaño de clip apropiado y de determinar la cantidad de clips a aplicar para lograr hemostasis.
- Los aplicadores sólo pueden utilizarse para colocar los clips de polímero de Welfare Medical.
- Asegúrese de que el tamaño del clip es apropiado para la estructura a ligar
- Los tamaños de estructura a ligar recomendados son:
 - Tamaño del clip – Tamaño del vaso
 - Mediano/grande – 3 a 10 mm
 - Grande – 5 a 13 mm
 - Extra grande – 7 a 16 mm
- Luego de colocar cada clip se debe cerrar completamente el aplicador
- Asegúrese de que cada clip ha sido correctamente colocado y completamente cerrado en la estructura ligada.
- No presione el aplicador sobre otros instrumentos quirúrgicos
- No utilice aplicadores dañados.
- Los siguientes factores poseen serias influencias sobre el cerrado de los clips: condición del aplicador, fuerza utilizada por el cirujano para cerrar el clip, tamaño de la estructura ligada y características del propio clip
- Elimine todos los instrumentos y accesorios abiertos, usados o no usados.


Cuidado, limpieza y esterilización de aplicadores reutilizables:



COSTANZO RICARDO FELIPE
FARMACEUTICO
MN. 11037 MP. 17268
DIR. TEC. MARMEDICAL S.A.



MARMEDICAL S.A.
MARIANO N. PEREZ
PRESIDENTE

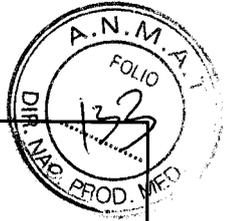

 MARMEDICAL	Clips de polímero y aplicadores INFORME TÉCNICO (ANEXO III-C)
--	--

Las mordazas del aplicador son delicadas pueden dañarse fácilmente. La mala manipulación de los aplicadores puede resultar en carga o cierre inapropiados de los clips. El cuidado, limpieza y mantenimiento son importantes para asegurar el buen funcionamiento. Todos los aplicadores reutilizables fabricados por Welfare Medical son provistos no estériles. Los mismos deben ser limpiados y esterilizados antes de cada uso de acuerdo a la práctica de cada hospital. Los aplicadores de clips endoscópicos no requieren ser desensamblados para su limpieza y esterilización pero el mecanismo interno de la vaina debe ser cuidadosamente limpiado usando el canal para enjuague. Se recomienda la esterilización por vapor con ciclo de pre vacío durante 4 min a 131 – 134 °C.

ALMACENAMIENTO:

Este instrumento debe ser almacenado en un lugar seco y lejos de temperaturas extremas.

No doble el envoltorio del producto. Verifique la fecha de Esterilización; si ha caducado, no utilice.

1.4 FORMAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

Los clips se presentan estériles mediante con óxido de etileno.

Los aplicadores reutilizables se presentan no estériles.

Los clips se presentan en cartuchos de 6 unidades y el envasa secundario consiste en caja conteniendo 14 cartuchos.

1.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE FABRICACIÓN: Ver Adjunto C-1

1.6 REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y EFICACIA: Ver Adjunto C-2

MARMEDICAL S.A.
 MARIANO N. PEREZ
 PRESIDENTE

COSTANZO RICARDO FELIPE
 FARMACEUTICO
 MN. 11037 MF 17268
 DIR. TEC. MARMEDICAL S.A.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-47-3110-02367-16-4

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **6956**, y de acuerdo con lo solicitado por MARMEDICAL S.A. , se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: CLIPS DE POLIMERO Y APLICADORES

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): WELFARE MEDICAL

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-213 pinzas, de otro tipo.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Marcar y/o ligar cualquier estructura tisular o vasos durante una operación donde se requiera clips no absorbibles, utilizadas sobre todo en cirugía general, colorectal, urológica y ginecológica.

Modelo/s: Clips de polímero medianos grandes WM-PC230

Clips de polímero grandes WM-PC240

Clips de polímero extragrandes WM-PC250

Aplicador abierto de clips de polim. med-grand WM-PC25ML

Aplicador abierto de clips de polim. Grandes WM-PC25L

Aplicador abierto de clips de polim. Extragrandes WM-PC25EL

Aplicador endoscópico de clips de polímero medianos-grandes WM-PC205ML

Aplicador endoscópico de clips de polímero grandes WM-PC205L

Aplicador endoscópico de clips de polímero extragrandes WM-PC205EL

Período de vida útil: 3 años

Forma de presentación: Los Clips se presentan estériles (EO) en cartuchos de 6 unidades en cajas de 14 cartuchos. Los aplicadores se presentan no estériles.


Condición de uso: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Nombre del fabricante: WELFARE MEDICAL Ltd.

Lugar/es de elaboración: Pure offices, Tachbrook Park, Warwick, CV34 6WE, Reino Unido

Se extiende a MARMEDICAL S.A. el Certificado de Autorización e Inscripción del PM-1507-9, en la Ciudad de Buenos Aires, a **23 JUN 2017**, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº **6956**

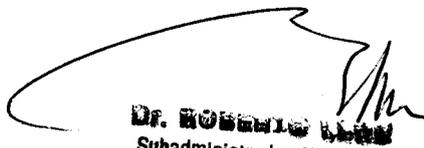
Dr. ROBERTO LÓPEZ
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.