



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 7005

BUENOS AIRES, 23 JUN. 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-543-17-0 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma SONOCARE S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2042-102, denominado: Sistema digital de diagnóstico por imágenes, marca MINDRAY.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2042-102, denominado: Sistema digital de diagnóstico por imágenes, marca MINDRAY.

ARTÍCULO 2º.- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2042-102.

E. A.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 7005

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizadas, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-543-17-0

DISPOSICIÓN N°

7005

sao

E

Dr. ROBERTO LEDEZ
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **7005**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2042-102 y de acuerdo a lo solicitado por la firma SONOCARE S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Sistema digital de diagnóstico por imágenes.

Marca: MINDRAY

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 4363/12.

Tramitado por expediente N° 1-47-17106/11-8.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Modelo/s	M5, M7, M9	M5, M6, M7, M9
Rótulos	Aprobado por Disposición ANMAT N° 4107/16.	A fs. 26.
Instrucciones de Uso	Aprobado por Disposición ANMAT N° 4107/16.	A fs. 28 a 51.

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma SONOCARE S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2042-102, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días...**23 JUN...**2017.

Expediente N° 1-47-3110-543-17-0


DISPOSICIÓN N°

7005

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
ANMAT.

**ANEXO III B
MODELO DE RÓTULO**

23 JUN. 2017
7005

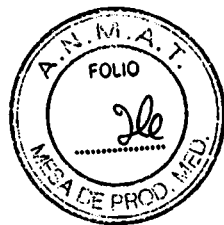

EQUIPO IMPORTADO POR SONOCARE S.A.

Nazaret 3182 Piso 1 Dpto 12 Córdoba República Argentina
Tel/Fax: 54 (0351) 4820285 e-mail: info@sonocare.com.ar

EQUIPO:	Sistema digital de diagnóstico por imágenes de ultrasonido		
MARCA:	Mindray		
FABRICANTE:	Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P. R. China		
MODELO:	Según corresponda		
Nº SERIE:	xxxxx		
LEGAJO ANMAT Nº:	2042	PAI:	102
DIRECTOR TÉCNICO:	Sergio Lacassagne		
MATRÍCULA PROFESIONAL:	5850		
CONDICION DE VENTA:	Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias		


Advertencias y Precauciones: ver manual de advertencias.

Instrucciones de Uso: ver manual de usuario.


SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

F

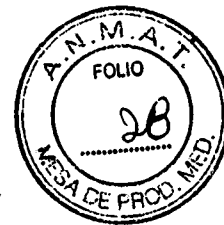

7005

ANEXO III B
INSTRUCCIONES DE USO

3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítem 2.4 y 2.5.

EQUIPO IMPORTADO POR SONOCARE S.A.	
Nazaret 3182 Piso 1 Dpto 12 - Córdoba - República Argentina Tel/Fax: 54-(0351) 4820285 e-mail: info@sonocare.com.ar	
EQUIPO:	Sistema digital de diagnóstico por imágenes de ultrasonido
MARCA:	Mindray
FABRICANTE:	Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P. R. China
MODELO:	Según corresponda
Nº SERIE:	xxxxx
LEGAJO ANMAT Nº:	2042 PNE: 102
DIRECTOR TÉCNICO:	Sergio Lacassagne
MATRÍCULA PROFESIONAL:	5850
CONDICION DE VENTA:	Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
Advertencias y Precauciones: ver manual de usuario.	
Instrucciones de Uso: ver manual de usuario.	

3.2. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados;

Clasificación de seguridad

- (1) Según el tipo de protección frente a descargas eléctricas:
EQUIPO DE CLASE I
- (2) Según el grado de protección frente a descargas eléctricas:
EQUIPO DE TIPO BF
- (3) Según el grado de protección frente a la entrada peligrosa de agua: La unidad principal pertenece a IPX0, los transductores a IPX7 y los pedales: 971 SWNOM pertenecen al grado de protección IPX8.

SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE

SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

G

7005



(4) Según el grado de seguridad de la aplicación en presencia de MEZCLA DE ANESTÉSICOS INFLAMABLES CON AIRE o CON OXÍGENO U ÓXIDO NITROSO:

EQUIPO no adecuado para su uso en presencia de una MEZCLA DE ANESTÉSICOS INFLAMABLES CON AIRE o CON OXÍGENO U ÓXIDO NITROSO

(5) Según el modo de funcionamiento:
FUNCIONAMIENTO CONTINUO

(6) Según la instalación y el uso:
EQUIPO PORTÁTIL
EQUIPO MÓVIL (Cuando el sistema es instalado en el carro móvil)

Significado de las advertencias impresas

Las advertencias impresas como PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y NOTA se utilizan en relación con la seguridad y otras instrucciones importantes. A continuación, se definen las advertencias impresas y sus significados. Debe entender sus significados claramente antes de leer el manual.

PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminentemente que, si no se evita, provocará lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

NOTA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños materiales.

Precauciones para garantizar la seguridad del paciente y del operador a la hora de utilizar el sistema.


SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

7005



Riesgos de explosión

No utilice gases inflamables, como gas anestésico, oxígeno o hidrógeno, ni líquidos inflamables, como etanol, cerca del producto porque existe riesgo de explosión.

No conecte el cable de la conexión a tierra a un conducto de gas o de agua, ya que podría no resultar efectivo o podría existir riesgo de una explosión de gas.

Riesgos eléctricos

(1) Conecte la clavija de este equipo a la toma de corriente mural y compruebe que ésta cumple con los valores nominales indicados en la placa de características técnicas. El empleo de un adaptador o receptáculo multifuncional puede afectar al funcionamiento del sistema de conexión a tierra y crear una corriente de fuga que supere los requisitos de seguridad. Además, conecte la impresora de vídeo a la toma auxiliar de corriente de este sistema y utilice el cable de impresión suministrado con el sistema para conectar dicha impresora. De lo contrario podría provocar una descarga eléctrica.

(2) Se debe utilizar el adaptador de alimentación provisto por el sistema, caso contrario puede resultar en una descarga eléctrica. Sólo se debe adoptar la fuente de alimentación provista por Mindray, otro tipo de fuente puede ocasionar en una descarga eléctrica

(3) Asegúrese de conectar el cable guía de equalización de potencial antes de insertar la clavija de alimentación del equipo en el receptáculo. Asegúrese, además, de retirar la clavija de alimentación del equipo del receptáculo antes de desconectar el cable para evitar descargas eléctricas.

(4) Conecte siempre el conductor de tierra antes de ACTIVAR el sistema. Desconecte siempre el cable de la conexión a tierra después de DESACTIVAR el sistema. De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas.

(5) Para la conexión de la alimentación eléctrica y la conexión a tierra, siga los procedimientos correspondientes que se describen en el manual de funcionamiento. De lo contrario, existirá riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.

(6) Antes de limpiar el sistema, asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente. Si el sistema presenta defectos, existe riesgo de descarga eléctrica.


SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

- (7) Este equipo no cuenta con dispositivos impermeables. Por ello, no lo utilice en un lugar en el que exista riesgo de mojarse. Si se moja el equipo o penetra agua en el mismo, existe riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.
- (8) Utilice el transductor con cuidado. En caso de que el cuerpo entre en contacto con la superficie rayada del transductor, deje de utilizarlo de inmediato. Si utiliza el transductor rayado, existe riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- (9) Asegúrese de que el paciente no pueda entrar en contacto con los elementos electrificados del ecógrafo u otros equipos, tales como los puertos de E/S de señal. Si el ecógrafo presenta defectos, existe riesgo de descargas eléctricas.
- (10) No golpee los transductores. El uso de transductores defectuosos puede provocar descargas eléctricas.
- (11) No abra la carcasa ni el panel frontal. Si abre la carcasa mientras el sistema está conectado, puede producirse un cortocircuito o una descarga eléctrica.
- (12) No utilice este sistema al mismo tiempo que equipos tales como unidades de electrocirugía, equipos de alta frecuencia terapéuticos o desfibriladores, etc.; de lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica al paciente.
- (13) No conecte este sistema a salidas que tengan los mismos disyuntores y fusibles que controlan la corriente a dispositivos como sistemas de soporte vital. Si el sistema falla y provoca una sobrecarga de corriente, o si se produce una corriente instantánea cuando esté CONECTADO, es posible que se activen los disyuntores y fusibles del circuito de suministro del edificio.
- (14) Mantenga siempre la máquina seca. Evite los cambios bruscos de temperatura durante el transporte, ya que puede formarse condensación o gotas de agua que provoquen cortocircuitos.
- (15) Utilice las piezas opcionales y los dispositivos periféricos suministrados o recomendados, así como los cables proporcionados. De no hacerlo, el rendimiento del sistema puede verse afectado e, incluso, se pueden producir descargas eléctricas.
- (16) No conecte o desconecte el cable de alimentación del equipo o sus accesorios sin antes apagar el sistema. Esto puede causar un daño en el sistema y en sus accesorios o provocar una descarga eléctrica.

(17) Si conecta otro dispositivo al carro, debe conectar el cable equipotencial a cada terminal equipotencial de los equipos, de lo contrario puede ocurrir una descarga eléctrica.

(18) Se deben utilizar los cables de ECG provistos por el módulo de ECG, de lo contrario puede ocurrir una descarga eléctrica.

Precauciones sobre el uso de baterías

PELIGRO

(1) Las baterías tienen un mecanismo de protección. No desmonte ni modifique la batería.

(2) Al conectar directamente los terminales negativos con objetos de metal se pueden generar cortocircuitos.

(3) No caliente la pila y no la queme para desecharla.

(4) Mantenga las baterías lejos del fuego y otras fuentes de calor.

(5) No sumerja las pilas en el agua y no las deje en lugares donde puedan mojarse.

(6) No cargue las baterías cerca de una fuente de calor, como fuego o la calefacción.

(7) No perforo las pilas con un objeto afilado.

(8) No utilice baterías mezcladas con otros modelos de baterías.

(9) No ponga las pilas en un horno de microondas o recipiente a presión.

(10) Si las baterías emiten un olor o calor, están deformadas o descoloridas, o de manera parecen anormales durante el uso, la carga o almacenamiento, retire de inmediato e impida su uso.

NOTA

(1) Utilice sólo las pilas especificadas.

(2) Cargue las baterías periódicamente si no se han utilizado durante un largo período de tiempo. De lo contrario, el rendimiento de las baterías se degrada.

(3) Vuelva a colocar las dos pilas al mismo tiempo.

(4) Si sólo hay una batería en el sistema, no puede suministrar la potencia y no puede cargarse.


SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

PRECAUCIONES

- (1) Antes de utilizar las baterías, lea detenidamente la descripción de la etiqueta en la superficie de las pilas.
- (2) Si cuando utiliza las baterías por primera vez observa que están sucias o que emiten olor, no las utilice.
- (3) No exponga las baterías a fuentes de calor o presión alta.
- (4) No golpee las pilas.
- (5) No deje las baterías a la luz solar directa.
- (6) Las baterías están diseñadas para ser cargadas solamente en este sistema, y se deben cargar sólo cuando la temperatura ambiente es de entre 0 y 40 °C.
- (7) Guarde las pilas fuera del alcance de los niños.
- (8) Cuando las baterías no se utilizan durante 10 días o más, se las debe quitar del sistema y almacenar con precaución. No envuelva con material conductor, almacenarlos en lugar sombreado, fresco y seco.
- (9) No golpee las baterías.

Riesgos de incendio

No utilice transductores distintos a los especificados por Mindray. Si lo hace, los equipos y el propio transductor pueden resultar dañados, lo que puede provocar un accidente y, en el peor de los casos, un incendio.

Riesgos térmicos

No existe ningún riesgo de quemaduras por temperaturas elevadas durante la realización ecografías rutinarias, incluso si la temperatura superficial del transductor supera la temperatura corporal del paciente debido a la temperatura ambiental y los modos de exploración. Para evitar quemaduras por altas temperaturas, no aplique el transductor en la misma zona del paciente durante un tiempo prolongado. Aplique el transductor únicamente el tiempo necesario para el diagnóstico.


Precauciones relacionadas con las técnicas de exploración física

Este sistema deben utilizarlo sólo profesionales calificados. La selección de la técnica de exploración física adecuada debe basarse en la formación especializada y en la experiencia clínica.


SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

7005

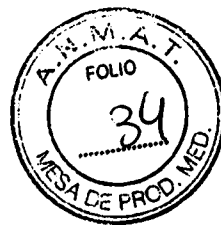

Fallos en el funcionamiento provocados por ondas de radio

El uso de dispositivos emisores de ondas de radio en las cercanías de este sistema médico electrónico puede interferir en su funcionamiento. No acerque ni utilice dispositivos que generen ondas de radio, como teléfonos móviles, transceptores y juguetes teledirigidos, en la habitación donde esté instalado el sistema.

Riesgos mecánicos: Precauciones relacionadas con la instalación y el desplazamiento del sistema

(1) Precauciones durante el transporte: Al trasladar el equipo, debe apagarlo, en primer lugar, y cerrar la pantalla LCD, desconectarlo de otros dispositivos (incluido el transductor), desconectarlo de la fuente de alimentación y liar el cable de alimentación en el soporte de bobinado; por último, levántelo con cuidado por el asa y llévelo a un lugar adecuado.

(2) Cuando coloque el sistema en el carro móvil y los movilice juntos, debe asegurar todos los objetos del carro móvil para evitar que se caigan. De lo contrario debe separar el sistema del carro móvil y movilizarlos de forma individual.

Cuando usted tiene que mover el sistema con el carro por las escaleras. Debe separarlos primero y luego moverlos de forma individual.

(3) No coloque objetos sobre el sistema, ya que puede caer y provocar lesiones a las personas que se encuentran cerca.

(4) Sujete los periféricos antes de desplazar el equipo. De lo contrario, los periféricos pueden caer y provocar lesiones.

(5) No provoque vibraciones excesivas en el equipo (al moverlo). De lo contrario, los elementos mecánicos, tales como las ruedas, pueden resultar dañados.

Esterilización


Este dispositivo y sus accesorios no se desinfectan ni esterilizan antes de su envío, de forma que debe desinfectar y esterilizar los transductores o soportes para biopsias según las instrucciones contenidas en los manuales antes de usar dichos transductores o soportes para biopsias. Tras la esterilización o


SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TÉCNICO

Página 7 de 24

7005

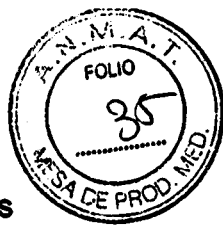

desinfección, deberán eliminarse por completo los productos químicos o gases de los accesorios. Los restos de productos químicos o gases no sólo pueden dañar los propios accesorios, sino que pueden resultar perjudiciales para la salud humana.

Entornos de utilización del equipo

(1) No utilice el equipo en las proximidades de campos electromagnéticos potentes (como un transformador), ya que pueden afectar de forma negativa al rendimiento del equipo.

(2) No utilice el equipo cerca de una fuente de radiación de alta frecuencia, ya que puede afectar negativamente al rendimiento del equipo o, incluso, derivar en un fallo del mismo.

(3) Para evitar dañar el equipo, no lo utilice en los siguientes entornos:


- Lugares expuestos a la luz solar directa.
- Lugares sometidos a cambios bruscos de temperatura.
- Lugares con polvo.
- Lugares sometidos a vibraciones.
- Lugares cerca de generadores de calor.
- Lugares con humedad elevada.

Aviso sobre el látex

Las reacciones alérgicas en pacientes sensibles al látex (goma natural) pueden ir desde reacciones cutáneas leves (irritaciones) hasta choques anafilácticos, y puede incluir dificultades al respirar (sibilancia), vértigo, choque, hinchazón de la cara, urticaria, estornudos o picor de ojos (en los EE.UU., alerta médica del FDA sobre productos de látex "Allergic Reactions to Latex-containing Medical Devices" (Reacciones alérgicas a dispositivos médicos que contienen látex), publicada el 29 de marzo de 1991).

Utilización de teclados

La utilización prolongada y con frecuencia de teclados puede ocasionar trastornos nerviosos en las manos o en los brazos de algunos usuarios. Respete las normativas de seguridad e higiene laborales locales referidas al uso de teclados.

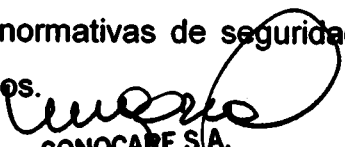
SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
ING. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

7005



Precauciones durante el uso del equipo

- (1) **ACTIVE** el sistema sólo cuando la potencia haya estado **DESACTIVADA** durante más de 20 segundos. Si el sistema se **CONECTA** inmediatamente después de **DESCONECTARLO**, el sistema puede evidenciar anomalías.
- (2) **APAGUE** el interruptor de alimentación auxiliar o detenga la transmisión a través del botón "congel" antes de conectar o desconectar un transductor. Si se conecta o desconecta un transductor mientras se visualiza una imagen, el sistema y/o el propio transductor pueden funcionar mal.
- (3) Después de usar el transductor, elimine el gel ecográfico depositado en el mismo y coloque el transductor en el soporte del transductor. De lo contrario, el agua que contiene el gel puede introducirse en las lentes acústicas y afectar de forma negativa al rendimiento y a la seguridad del transductor.
- (4) No aplique una fuerza externa sobre el panel de control, esto puede dañar al equipo.
- (5) Si se utiliza el sistema en una habitación pequeña, es posible que aumente la temperatura de la habitación. Por ello, es importante que exista una ventilación adecuada.
- (6) La función iScape construye una imagen única ampliada de de una serie de cuadros de imagen individuales. La calidad de la final imagen depende del usuario y requiere habilidades para técnicas para aplicar la función correctamente. Tenga precaución al realizar las mediciones desde una imagen iScape.
- (7) Tras un periodo de tiempo puede producirse una degradación de las características de seguridad eléctricas y mecánicas (tales como la generación de corriente de pérdida o deformación/abrasión de los elementos mecánicos), así como de la sensibilidad y resolución de la imagen. Para garantizar el funcionamiento normal del sistema, se recomienda firmar un acuerdo de servicio y mantenimiento para evitar accidentes.


Efectos biológicos: utilización prudente

Aunque no se han confirmado efectos biológicos en pacientes originados por la exposición a los instrumentos de ecografía diagnóstica, existe la posibilidad de que dichos efectos biológicos se identifiquen en el futuro. De este modo, la técnica ecográfica debe utilizarse de forma prudente para proporcionar


SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

7005

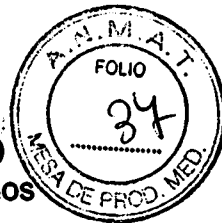

beneficios médicos al paciente. Deben evitarse los niveles elevados y los tiempos prolongados de exposición mientras se adquiere la información clínica necesaria.

Es necesario tener en cuenta el principio ALARA cuando se emplee la técnica de ecografía diagnóstica. Seguir el principio ALARA asegura que el nivel total de energía se controla por debajo de un nivel suficientemente bajo en el que los efectos biológicos no se generan mientras se acumula la información de diagnóstico. La energía total está controlada por la intensidad de emisión y el tiempo total de radiación. La intensidad de emisión necesaria para los exámenes es distinta dependiendo del paciente y el caso clínico. Los usuarios deben responsabilizarse de la seguridad de los pacientes y utilizar la técnica ecográfica con precaución. El uso con precaución de la ecografía significa que la potencia de emisión debe seleccionarse basándose en el principio ALARA.

3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura;


Dispositivos periféricos soportados

Los equipos auxiliares conectados a las interfaces analógica y digital deben cumplir con las normativas IEC adecuadas (por ejemplo, la normativa IEC 60950 sobre seguridad de los equipos de tecnología de la información y la normativa IEC 60601-1 sobre equipos médicos). Además, todas las configuraciones deberían cumplir con la normativa IEC 60601-1-1. La persona que conecte equipos adicionales a los puertos de entrada o salida de señal y configure un sistema médico, es la responsable de garantizar que el sistema cumple con los requisitos propuestos en la normativa IEC 60601-1-1.

3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así


SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
ING. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

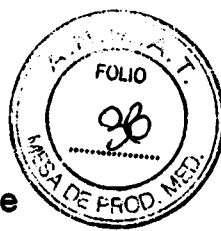

7005

como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos;

Control de calidad de la instalación

Item	Prueba	Resultado
Configuración	No faltan partes, las partes no están dañadas	
Apariencia	No presenta rayas	
Entorno de instalación		
Línea de voltaje	para el funcionamiento del dispositivo de suministro de energía, el voltaje de salida monofásico AC es estable	
Cable de puesta a tierra	La conexión del cable de puesta a tierra del Terminal de puesta a tierra de protección está correctamente conectado	
Funciones del panel		
a) Imagen de pantalla	La imagen se muestra normalmente.	
b) Función de expansión	Funciona normalmente	
c) Medición	Se pueden medir distancias	
d) Indicar marcas corporales	Las marcas corporales responden adecuadamente al teclado	
e) Entradas del teclado	Los caracteres pueden ser normalmente se introduce a través del teclado	
f) Configuración del sistema	Las configuraciones del sistema deben ser configuraciones iniciales	
g) de impresión	Las imágenes que aparecen en pantalla se pueden imprimir	
Visualización de imagen		
a) En la superficie del transductor, mover un destornillador de izquierda a derecha, y observar la imagen que aparece	La imagen de ultrasonido se muestran correctamente y completamente	
b) El ruido en el estado de funcionamiento	No debe haber ningún ruido específico en la imagen	
Movimiento del equipo	No coloque la máquina en una rampa, evitar la vibración mientras se mueve el equipo	
Los dispositivos periféricos		
	Registro de los modelos y números de serie de los dispositivos periféricos conectados.	
	Coloque los datos reales registrados por los dispositivos periféricos	
Evaluación de la seguridad eléctrica	Se debe confirmar la necesidad de realizar el test	
Impedancia de tierra de	Según IEC 60601 < 0.20	

SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE

SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

7005



protección		
Corriente de fuga a tierra (condición normal)	Según IEC 60601 : < 500μA	
Corriente de fuga a través de la carcasa (condición normal)	Según IEC 60601 : < 100μA	
Corriente de fuga al paciente (condición normal)	Según IEC 60601 : < 100μA	

Mantenimiento del sistema

El mantenimiento del sistema deberán completarlo los usuarios y los ingenieros de servicio de Mindray, pero una vez el sistema se ha adquirido, será el propietario el responsable del mantenimiento y uso.

ADVERTENCIA: Únicamente ingenieros profesionales pueden realizar el mantenimiento no especificado en este manual.

Plan de mantenimiento

Se recomienda aplicar el programa completo de inspección al año de la instalación del equipo.

Mantenimiento diario

El usuario deberá llevar a cabo el mantenimiento diario.

Limpieza del sistema

ADVERTENCIA: Antes de limpiar el sistema, compruebe que está apagado y que se ha desconectado el cable de alimentación de la toma de corriente. Si limpia el sistema mientras la alimentación está conectada, puede producirse una descarga eléctrica.

- (1) Limpieza del transductor: Consulte el manual de funcionamiento del transductor correspondiente en lo relativo a la limpieza, desinfección y esterilización.
- (2) Limpieza del cable del transductor: Utilice un paño suave y seco para eliminar las manchas. Si resultan difíciles de eliminar por completo, utilice un paño suave humedecido en jabón suave y luego déjelo secar al aire.
- (3) Limpieza del monitor: Utilice el paño humedecido en limpia cristales para limpiar el monitor y, a continuación, deje que se seque.

SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE

SONOCARE S.A.
DR. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

NOTA: No utilice limpia cristales con base de hidrocarburos ni los limpiadores usados con los equipos de oficina para limpiar el monitor. Estas sustancias pueden deteriorar el monitor.

(4) Método para la limpieza del panel de control, la carcasa y el soporte: Utilice un paño suave y seco para limpiar la superficie del sistema. Si el sistema está muy sucio, humedezca el paño suave con un jabón neutro y limpie las manchas. A continuación, utilice el paño suave y seco para eliminar la humedad del sistema, o deje que se seque.

(5) Limpieza de la bola de control:

Desmontaje de la bola de control: Presione las protuberancias en la anilla de retención con ambas manos y gire 35° el anillo en el sentido antihorario hasta que se levante. Extraiga la anilla y la bola giratoria. Tenga cuidado de no dejar caer la bola.

Limpieza de la bola de control: Limpie los dos ejes largos, el rodamiento y la bola giratoria con un paño suave y seco o un papel.

Instalación de la bola de control: Coloque de nuevo la bola giratoria en su alojamiento y luego alinee la anilla de retención con la muesca presente en la cubierta superior. Presione las protuberancias de la anilla con ambas manos y gire 35° en el sentido horario hasta que la anilla encaje. Cuando las protuberancias queden al ras con la cubierta superior, la anilla estará bien colocada.

3.5. La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico;

No aplica.

3.6. La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos;

No aplica.



SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE



SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

7005

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización;

No aplica.

3.8. Si un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones.


Limpieza y desinfección de accesorios

Consideraciones de seguridad

- (1) Nunca sumerja el conector del transductor en líquidos como agua o desinfectantes. La inmersión podría causar una descarga eléctrica o el mal funcionamiento del transductor.
- (2) Cuando realice la limpieza y desinfección, para prevenir infecciones, utilice guantes esterilizados.
- (3) Después de la desinfección, enfangar el transductor en forma exhaustiva con agua esterilizada para remover los residuos químicos. Los residuos químicos sobre el transductor pueden ser nocivos para el cuerpo humano.
- (4) Después de una examinación, quite completamente el gel de ultrasonido del transductor, en caso contrario el gel de ultrasonido puede solidificarse y la calidad de la imagen podría degradarse.
- (5) No permita que el transductor se sobrecaliente (más de 55° C) durante la limpieza y desinfección. Las altas temperaturas pueden generar daños o deformaciones al transductor.

Limpieza

- (1) Use guantes esterilizados para prevenir infecciones.

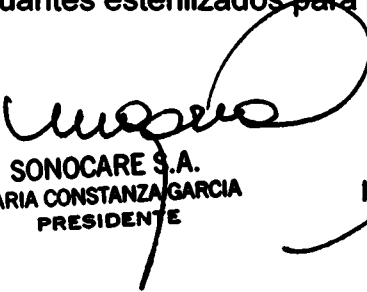
SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

7005



(2) Enjuague el transductor con agua y remueva todo el material extraño. Se puede utilizar agua con jabón como así también esponjas suaves para la limpieza. Evite el uso de cepillos, estos pueden dañar el transductor.

(3) Quite el agua del transductor usando un trapo o gasa esterilizada. No seque el transductor con calor.

Desinfección

(1) Use guantes esterilizados para prevenir infecciones.

(2) Limpie el transductor antes de desinfectarlo.


Se recomienda la siguiente solución para desinfectar el transductor.

Desinfectante en base a glutaraldehído:


Nombre químico	Nombre tradicional	Procedimiento
Glutaraldehído (2,4%)	Cixed Activado Solución dialdehído	Remítase a las instrucciones provistas por el fabricante de la solución para detalles

- Remitirse a las instrucciones provistas por el fabricante del producto químico se refiere a la concentración de la solución desinfectante, el método de desinfección y dilución y los cuidados durante el uso.
- No moje el conector del transductor ni el cable con agua o cualquier solución.
- Ponga el transductor en la solución desinfectante por un corto lapso de tiempo, aproximadamente 12 minutos.
- Enjuague el transductor con abundante agua esterilizada durante 1 minuto para remover todos los residuos químicos. O realice el método recomendado por el fabricante del desinfectante para la desinfección del transductor.
- Quite el agua del transductor usando un trapo o gasa esterilizada. No seque el transductor con calor.

En el caso de utilizar la guía de biopsia (accesorio opcional) debe llevar a cabo los siguientes procedimientos de esterilización

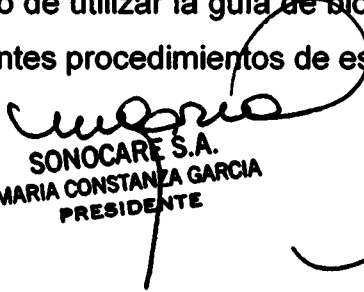
SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

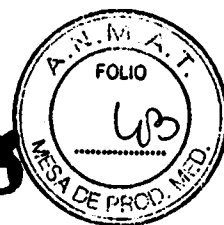

7009

- (1) Use guantes esterilizados para evitar infecciones.
- (2) Limpie la guía de biopsia antes de esterilizarla.
- (3) Se recomienda el siguiente

Nombre químico	Nombre tradicional	Procedimiento
Glutaraldehído (2,4%)	Cixed Activado Solución dialdehído	Remítase a las instrucciones provistas por el fabricante de la solución para detalles

- Remitirse a las instrucciones provistas por el fabricante del producto químico se refiere a la concentración de la solución, el método de esterilización y dilución y los cuidados durante el uso. La solución esterilizante de glutaraldehído, necesita una solución activadora.
- Enjuague la guía de biopsia con agua para quitar los residuos químicos.
- Quite el agua de la guía de biopsia usando un trapo o gasa esterilizada.

Sistema de esterilización de gas plasma STERRAD 100S

Nombre químico	Nombre tradicional	Procedimiento
Plasma peróxido de hidrógeno gas	Sterrad 100S	Remítase a las instrucciones provistas por el fabricante de la solución para detalles

3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros);

No aplica.

3.10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser descripta:

[Signature]
SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE

[Signature]
SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

[Handwritten mark]

No aplica.

3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico;

Para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz del sistema, necesita realizar ciertas tareas de mantenimiento y comprobación diariamente. En caso de advertir algún tipo de anomalía, apague el equipo inmediatamente y póngase en contacto con el Departamento de Ventas, el Departamento de Atención al cliente o con el representante de Mindray. Si emplea un equipo con anomalías, puede producir lesiones al paciente y dañar los equipos.

3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras;

(1) El sistema no debe colocarse junto a, o apilado con, otros equipos. Si es necesario colocarlo junto a, o apilado con, otros equipos, debe estar bajo observación para comprobar el funcionamiento normal de la configuración en la que se utilizará.


(2) El sistema necesita precauciones especiales en lo referente a CEM (compatibilidad electromagnética) y es necesario que lo instale y ponga en servicio de acuerdo con la información de CEM que se expone a continuación.

(3) Prevención de inmunidad de RF conducida. Debido a las limitaciones tecnológicas, el nivel de inmunidad de RF conducida queda limitado a 1 Vrms. La interferencia de RF conducida superior a 1 Vrms puede dar lugar diagnósticos y mediciones erróneos. Sugerimos colocar el sistema lejos de fuentes de ruido de RF conducida.

(4) Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles pueden afectar al sistema. Consulte las tablas siguientes.


SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

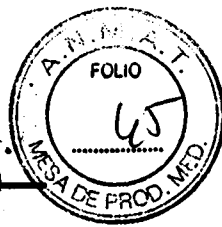


7005


AYUDA Y DECLARACIÓN DE MINDRAY - EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS

El sistema está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario del sistema debe garantizar que se utilice en dicho entorno.

PRUEBA DE EMISIONES	CONFORMIDAD	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO - AYUDA
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	EL sistema utiliza energía de RF sólo para su funcionamiento interno. Por tanto, las emisiones de RF son muy bajas y no es probable que originen interferencias con los equipos electrónicos cercanos. EL sistema puede utilizarse en cualquier tipo de establecimiento, incluidos los domésticos y los que se encuentran conectados directamente a la red eléctrica pública de baja tensión que proporcionan los edificios empleados para fines domésticos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de tensión/Emisiones fluctuantes IEC 61000-3-3	Conformidad	


E

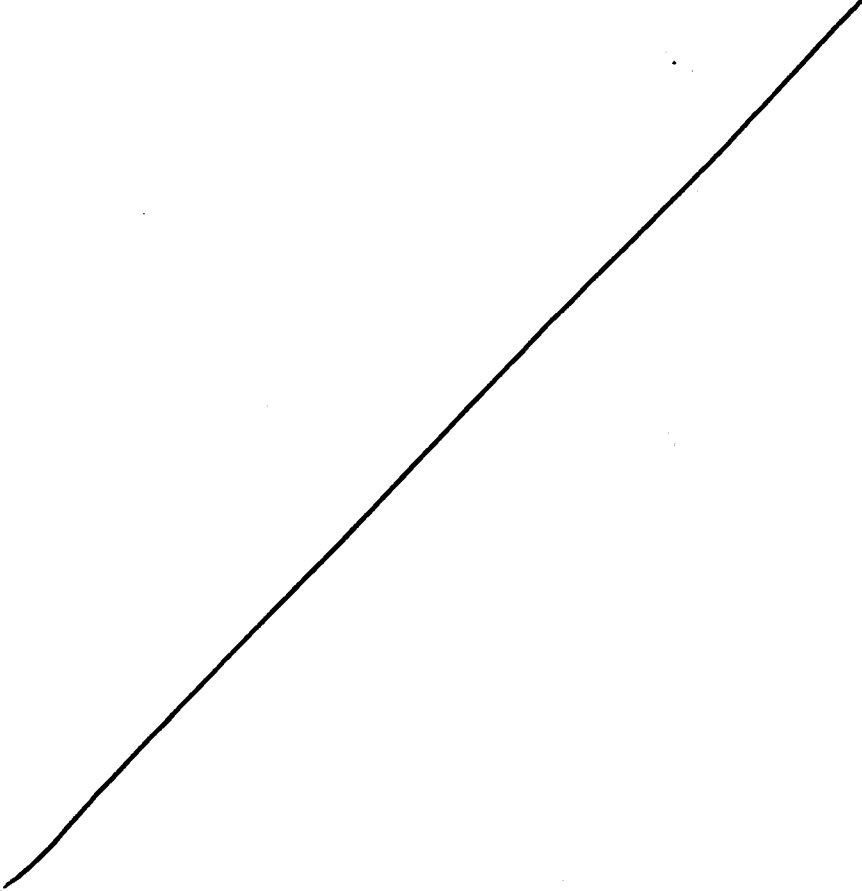

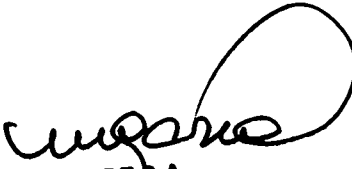
SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO

7005

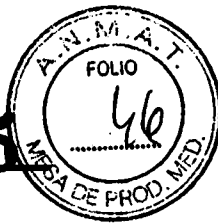

AYUDA Y DECLARACION DE MINDRAY - INMUNIDAD ELECTROMAGNETICA

El sistema está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario del sistema debe garantizar que se utilice en dicho entorno.


PRUEBA DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CONFORMIDAD	ENTORNO ELECTROMAGNETICO-AYUDA
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contacto ±8 kV aire	±6 kV contacto ±8 kV aire	Los suelos deben ser de madera, hormigón o cerámica. Si estuvieran cubiertos de material sintético, la humedad relativa debe ser, al menos, del 30%.
Descargas u oscilaciones eléctricas rápidas IEC 61000-4-4	±2 kV para líneas de alimentación eléctrica ±1 kV para líneas de entrada/salida	±2 kV para líneas de alimentación eléctrica ±1 kV para líneas de entrada/salida	La calidad de la potencia de la red eléctrica debe ser la de un entorno habitual de hospital o comercial.
Sobretensión transitoria IEC 61000-4-5	±1 kV línea(s) a línea(s) ±2 kV línea(s) a tierra	±1 kV línea(s) a línea(s) ±2 kV línea(s) a tierra	La calidad de la potencia de la red eléctrica debe ser la de un entorno habitual de hospital o comercial.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en líneas de entrada de suministro eléctrico IEC 61000-4-11	<5% U_T (>95% caída en U_T) durante 0,5 ciclos 40% U_T (60% caída en U_T) durante 5 ciclos 70% U_T (30% caída en U_T) durante 25 ciclos <5% U_T (>95% caída en U_T) durante 5 s	<5% U_T (>95% caída en U_T) durante 0,5 ciclos 40% U_T (60% caída en U_T) durante 5 ciclos 70% U_T (30% caída en U_T) durante 25 ciclos <5% U_T (>95% caída en U_T) durante 5 s	La calidad de la potencia de la red eléctrica debe ser la de un entorno habitual de hospital o comercial. Si fuera necesario un funcionamiento continuo durante periodos de interrupción de la corriente eléctrica, se recomienda que el producto se conecte a una fuente de alimentación ininterrumpida o a una batería.
Frecuencia de red (50/60 HZ) campo magnético IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los niveles de los campos magnéticos de frecuencia de la red deben ser los habituales de cualquier hospital o local comercial.

NOTA: U_T es la tensión de la línea principal de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.


SONOCARE S.A.
 MARIA CONSTANZA GARCIA
 PRESIDENTE



SONOCARE S.A.
 Ing. SERGIO LACASSAGNE
 DIRECTOR TECNICO

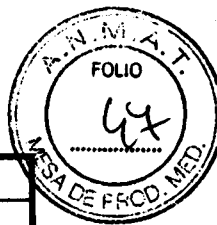2005



GUÍA Y DECLARACIÓN DE MINDRAY—INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

EL SISTEMA está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario del SISTEMA debe garantizar que se utilice en dicho entorno

PRUEBA DE INMUNIDAD	IEC 60601-1-2 NIVEL DE PRUEBA	NIVEL DE CONFORMIDAD	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO-GUÍA
RF conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms de 150 kHz a 80 MHz	1 Vrms	No utilice el equipo de comunicaciones de RF móvil y portátil a una distancia inferior de la recomendada respecto a los componentes del equipo, incluidos los cables. Esta distancia de separación se calcula a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada $d = 3,5 \times \sqrt{P}$ $d = 1,2 \times \sqrt{P}$ de 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3 \times \sqrt{P}$ de 800 MHz a 2,5 GHz donde P equivale a la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d equivale a la distancia de separación recomendada en metros (m). ^b Las intensidades del campo derivadas de transmisores de RF fijos, tal y como ha determinado una inspección de la ubicación electromagnética, a debe ser inferior al nivel de conformidad de cada intervalo de frecuencia. ^b Pueden producirse interferencias cerca de los equipos marcados por el símbolo: 
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m de 80 MHz a 2.5 GHz	3V/m	

Nota1: A 80 MHz y 900 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia más alto.

Nota2: Estas directrices no se aplican en todos los casos. La absorción y la reflexión de estructuras, objetos e individuos puede afectar a la propagación electromagnética.

La predicción teórica de las intensidades del campo procedentes, como las estaciones base de radiotelefonía (dispositivos móviles o inalámbricos) y de radio móvil terrestre, de radioaficionados y de emisiones televisivas y de radiodifusión de AM y FM, no pueden efectuarse con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético derivado de los transmisores de RF fijos, debe realizarse una inspección de la ubicación electromagnética. Si la intensidad del campo obtenida en el lugar donde se encuentra EL SISTEMA supera el límite anterior de conformidad de RF aplicable, observe el sistema para garantizar que funciona con normalidad. Si observa un rendimiento irregular, deberá tomar otras medidas, como la nueva orientación y ubicación del sistema.

- Por encima de los intervalos de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deberán ser inferiores a 1V/m.

[Handwritten mark]

[Signature]
SONOCARE S.A.
 MARIA CONSTANZA GARCIA
 PRESIDENTE

[Signature]
SONOCARE S.A.
 Ing. SERGIO LACASSAGNE
 DIRECTOR TECNICO

DISTANCIAS DE SEPARACIÓN RECOMENDADAS ENTRE LA COMUNICACIÓN DE RF PORTÁTIL Y MÓVIL Y EL SISTEMA

EL SISTEMA se ha diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético en el que están controladas las perturbaciones de las radiofrecuencias radiadas. El cliente o usuario del sistema puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas; para ello, debe mantener una distancia mínima entre los dispositivos de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores), el equipo y el sistema como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima de los dispositivos de comunicaciones.


Potencia nominal de salida máxima del transmisor en W (vatios)	Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor M (metros)		
	de 150 kHz a 80 MHz $d = 3.5\sqrt{P}$	de 80 MHz a 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	de 800 MHz a 2.5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.35	0.12	0.23
0.1	1.11	0.37	0.74
1	3.50	1.17	2.34
10	11.07	3.69	7.38
100	35.00	11.87	23.34

Para aquellos transmisores cuya potencia de salida máxima no está recogida anteriormente, puede determinar la distancia de separación recomendada en metros (m) a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P equivale a la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W), de acuerdo con el fabricante del transmisor. Si se produce la distorsión de la imagen del sistema, puede que sea necesario colocar el sistema lejos de las fuentes de ruido de RF conducida o instalar el filtro de fuente de potencia externa para minimizar el ruido de RF a un nivel aceptable.

Nota1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencia más elevada.

Nota2: Estas directrices no se aplican en todos los casos. La absorción y la reflexión de estructuras, objetos e individuos puede afectar a la propagación electromagnética.

7005

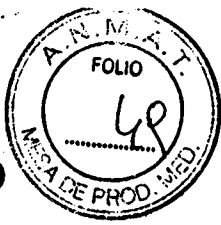

Muestra de cable

N°	Nombre	Longitud del cable (m)	Blindado o no	Observaciones
1	Cable de entrada de CA para la unidad principal	2,5	Sin blindar	/
2	Cable de entrada de CA para el carro	2,5	Sin blindar	/
3	Derivación ECG	1,4	Sin blindar	/
4	Cable de control del pedal	2,8	Sin blindar	/
5	Cable de sonda	2,2	Blindado	/

3.13. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico de que trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar;

No aplica

3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación;

La eliminación de maquinas y accesorios debe estar de acuerdo con las regulaciones nacionales para el procesamiento de desperdicios.

Todos los materiales y componentes que pongan en riesgo el medio ambiente deben ser removidos al término de la vida útil de las maquinas y accesorios.

Por favor consulte a su representante local antes de desechar estos productos.

3.15. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo, conforme al ítem 7.3. del Anexo de la Resolución GMC N°72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

No aplica.


SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO



7005

3.16. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición

Imagen en dos dimensiones

Parámetro	Valor máximo	Error
Distancia/profundidad	Máximo 300mm	Dentro de $\pm 3\%$; o cuando el valor medido es menor a 40mm, el error es menor a 1.5mm
Área (trazo)	Máximo $\geq 1126\text{cm}^2$	Dentro de $\pm 7\%$; o cuando el valor medido es menor a 16cm^2 , el error es menor a 1.2cm^2
Área (elipse/círculo)	Máximo $\geq 884\text{cm}^2$	Dentro de $\pm 7\%$; o cuando el valor medido es menor a 16cm^2 , el error es menor a 1.2cm^2
% de estenosis	Máximo 1.0	Dentro de $\pm 7\%$.
Ángulo	0-180°	Dentro de $\pm 3\%$.
Volumen	Máximo 999cm^3	Dentro de $\pm 10\%$; o cuando el valor medido es menor a 64cm^3 , el error es menor a 6.4cm^3

Mediciones de movimiento/tiempo

Parámetro	Valor máximo	Error
Distancia	Máximo $\geq 300\text{mm}$	Dentro de $\pm 3\%$; o cuando el valor medido es menor a 40mm, el error es menor a 1.5mm
Tiempo	Máximo 8s	Dentro de $\pm 2\%$;
Pulso cardíaco	15-999 pulsos por minuto	Dentro de $\pm 4\%$;
Gradiente (modo M)	Máxima 999mm/s	Dentro de $\pm 4\%$;


SONOCARE S.A.
MARIA CONSTANZA GARCIA
PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
Ing. SERGIO LACASSAGNE
DIRECTOR TECNICO



7005


Mediciones Doppler

Parámetro	Valor máximo	Error
Velocidad	20-250cm/s	Cuando el angulo 60°; <5%

Mediciones en iScape

Parámetro	Valor máximo	Error
Distancia	Linear /convex	Dentro de ±5%

L

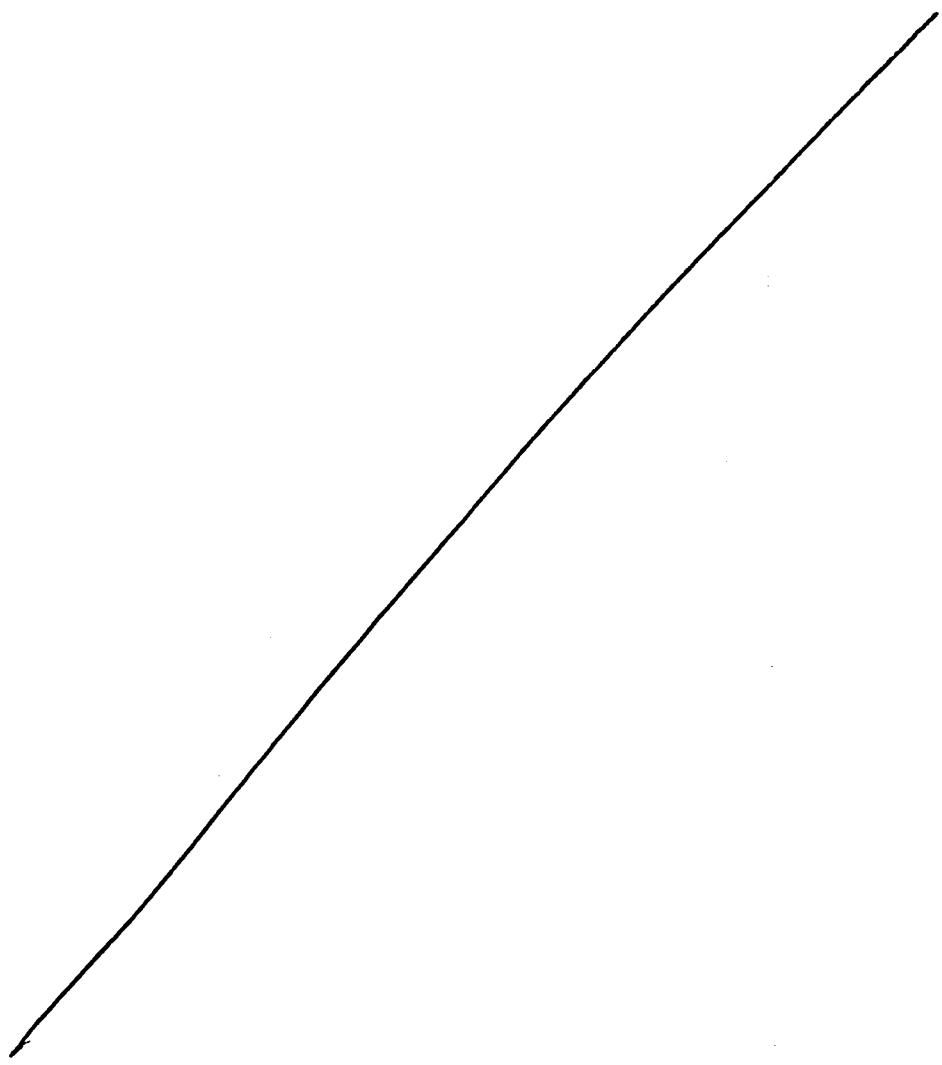


SONOCARE S.A.
 MARIA CONSTANZA GARCIA
 PRESIDENTE


SONOCARE S.A.
 Ing. SERGIO LACASSAGNE
 DIRECTOR TECNICO