



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-2886-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 22 de Marzo de 2018

Referencia: 1-47-3110-7759-17-2

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-7759-17-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca SAI®, AS®, NOBLE®, CONTACTLESS®, PRO ANATOMIC®, nombre descriptivo SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A. y nombre técnico Placas, para huesos, de acuerdo con lo solicitado por SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2018-07632950-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-2022-47”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Inscribese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

Nombre descriptivo: Placas de osteosíntesis para miembro superior titanio.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-050 –Placas, para huesos.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): SAI®, AS®, NOBLE®, CONTACTLESS®, PRO ANATOMIC®

Clase de Riesgo: III.

Indicación/es autorizada/s: indicadas en configuraciones de fracturas que sean susceptibles al tratamiento del sistema de placas de fijación (Placas para Clavícula: fracturas diafisarias y periarticulares, fracturas del extremo distal con o sin luxación acromioclavicular, Placas para Escápula: Fracturas del cuerpo y acromion. Fracturas con compromiso de la cavidad glenoidea, Placas para Húmero: proximales; Fracturas de la cabeza humeral en 1, 2, 3, y 4 fragmentos, Distales; fracturas de paleta humeral de una o dos columnas, fracturas diafisarias y periarticulares, fracturas de epitroclea y epicóndilo, Placas para Radio: fracturas que afectan la diáfisis y las regiones periarticulares incluyendo radio distal, muñeca y cúpula radial, Proximal; fracturas intraarticulares de la cúpula radial, Distal: fracturas intra o extraarticulares en la región de la muñeca, Placas para Cúbito: fracturas diafisarias, periarticulares del cúbito incluido el olécranon y la estiloides, Distal; fractura de estiloides, Olécranon: fracturas intraarticulares del Olécranon), donde el tamaño, forma y localización del hueso fracturado sean apropiados para la utilización de una placa para la fijación y estabilización de una Fractura.

Modelo/s:

OPF-00-CR00-T-O-3.5 COMUN EN TITANIO CON PLACAS DE RECONSTRUCCION

OPF-00-BDL0-T-O-3.5 BLOQUEADA EN TITANIO BAJO CONTACTO

OPF-00-BRD1-T-O-3.5 BLOQUEADA EN TITANIO (DUO)

OPF-00-BR02-T-O-3.5 BLOQUEADA EN TITANIO CON PLACAS DE RECONSTRUCCION (DUO)

0HN-02-0000-T-O-PLACA PRO ANATOMIC

0AM-00-0000-T-O-ARTRODESIS DE MUÑECA EN TITANIO BLOQUEADA

0HP-00-0000-T-O-PHILO EN TITANIO

0HP-00-XL00-T-O-PLACA PHILO EN TITANIO EXTRA LARGA MOD

0HP-00-TORX-T-O-PHILO TORX EN TITANIO

0HN-00-0000-T-O-VOLAR SIMPLE Y DOBLE HILERA EN TITANIO STANDARD

0HD-00-0000-T-O-PLACAS DE OLECRANON Y HUMERO DISTAL OCL CSS

CRP-00-0000-T-O-PLACA PARA CUPULA RADIAL 2.7 BLOQUEADA EN TITANIO

CRP-00-0000-T-B-IMPLANTES DE CUPULA RADIAL - MALETIN

0CL-00-0000-T-O-CLAVICULA

0AB-01-0000-T-O-PLACAS DE ANTEBRAZO CSS TORNILLERA

0AB-02-0000-T-O-SISTEMA ANTEBRAZO (AS - AB2)

XPF-00-BTRD-T-O-3.5 BLOQUEADA EN TITANIO CON PLACAS DE RECONSTRUCCION Y DCP
DUO

XPF-00-BTR0-T-O-3.5 COMUN EN TITANIO CON PLACAS DE RECONSTRUCCION

0504-003-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM TITANIO X 3
ORIFICIOS

0504-004-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM TITANIO X 4
ORIFICIOS

0504-005-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM TITANIO X 5
ORIFICIOS

0504-006-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM TITANIO X 6
ORIFICIOS

0504-007-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM TITANIO X 7
ORIFICIOS

0504-008-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM TITANIO X 8
ORIFICIOS

0504-009-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM TITANIO X 9

ORIFICIOS

0504-010-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM TITANIO X 10 ORIFICIOS

0504-012-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM TITANIO X 12 ORIFICIOS

0504-014-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM TITANIO X 14 ORIFICIOS

0504-016-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM TITANIO X 16 ORIFICIOS

0573-002-PLACA PARA CÚPULA RADIAL BLOQUEADA 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO X 2 ORIFICIOS

0573-003-PLACA PARA CÚPULA RADIAL BLOQUEADA 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO X 3 ORIFICIOS

2302-003-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 3 ORIFICIOS

2302-004-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 4 ORIFICIOS

2302-005-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 5 ORIFICIOS

2302-006-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 6 ORIFICIOS

2302-007-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 7 ORIFICIOS

2302-008-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 8 ORIFICIOS

2302-009-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 9 ORIFICIOS

2302-010-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 10 ORIFICIOS

2302-011-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 11 ORIFICIOS

2302-012-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 12 ORIFICIOS

2302-013-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 13 ORIFICIOS

2302-014-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 14 ORIFICIOS

2302-015-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 15 ORIFICIOS

2302-016-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 16 ORIFICIOS

2334-003-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 3

ORIFICIOS

2334-004-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 4 ORIFICIOS

2334-005-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 5 ORIFICIOS

2334-008-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 8 ORIFICIOS

2335-003-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 3 ORIFICIOS

2335-004-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 4 ORIFICIOS

2335-005-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 5 ORIFICIOS

2347-003-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 3 ORIFICIOS

2347-004-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 4 ORIFICIOS

2347-005-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 5 ORIFICIOS

2347-007-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 7 ORIFICIOS

2347-009-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2347-011-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 11 ORIFICIOS

2347-013-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 13 ORIFICIOS

2348-003-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 3 ORIFICIOS

2348-004-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 4 ORIFICIOS

2348-005-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 5 ORIFICIOS

2348-007-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 7 ORIFICIOS

2348-009-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2348-011-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 11 ORIFICIOS

2348-013-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 13 ORIFICIOS

2349-007-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 7 ORIFICIOS

2349-009-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2349-011-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 11 ORIFICIOS

2349-013-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 13 ORIFICIOS

2350-007-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 7 ORIFICIOS

2350-009-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2350-011-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 11 ORIFICIOS

2350-013-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 13 ORIFICIOS

2372-003-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 3 ORIFICIOS

2372-005-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2372-007-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS

2372-009-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS

2372-011-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 11 ORIFICIOS

2372-013-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 13 ORIFICIOS

2388-003-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 3 ORIFICIOS

2388-004-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 4 ORIFICIOS

2388-005-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2388-006-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 6 ORIFICIOS

2388-007-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS

2388-008-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 8 ORIFICIOS

2388-009-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS

2388-010-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 10 ORIFICIOS

2388-011-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 11 ORIFICIOS

2388-012-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 12 ORIFICIOS

2388-013-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 13 ORIFICIOS

2388-014-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 14 ORIFICIOS

2388-015-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 15 ORIFICIOS

2388-016-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 16 ORIFICIOS

2389-003-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 3 ORIFICIOS

2389-004-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 4 ORIFICIOS
2389-005-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 5 ORIFICIOS
2389-006-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 6 ORIFICIOS
2389-007-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 7 ORIFICIOS
2389-008-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 8 ORIFICIOS
2389-009-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 9 ORIFICIOS
2389-010-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 10 ORIFICIOS
2389-012-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 12 ORIFICIOS
2389-014-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 14 ORIFICIOS
2389-016-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 16 ORIFICIOS
2393-003-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 3 ORIFICIOS
2393-004-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 4 ORIFICIOS
2393-005-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS
2393-006-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 6 ORIFICIOS
2393-007-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS
2393-008-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 8 ORIFICIOS
2393-009-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS
2393-010-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 10 ORIFICIOS
2393-012-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 12 ORIFICIOS
2715-003-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 3 ORIFICIOS
2715-004-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 4 ORIFICIOS
2715-005-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS
2715-006-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 6 ORIFICIOS
2715-007-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS
2715-008-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 8 ORIFICIOS
2715-009-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS

2715-010-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 10 ORIFICIOS

2715-012-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 12 ORIFICIOS

2716-005-PLACA PARA OLÉCRANON OCL BLOQUEADA 3.5 MM DERECHA TITANIO X 5 ORIFICIOS

2716-007-PLACA PARA OLÉCRANON OCL BLOQUEADA 3.5 MM DERECHA TITANIO X 7 ORIFICIOS

2716-009-PLACA PARA OLÉCRANON OCL BLOQUEADA 3.5 MM DERECHA TITANIO X 9 ORIFICIO

2726-005-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2726-006-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 6 ORIFICIOS

2726-007-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS

2726-008-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 8 ORIFICIOS

2726-009-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS

2726-010-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 10 ORIFICIOS

2726-011-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 11 ORIFICIOS

2726-012-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 12 ORIFICIOS

2726-013-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 13 ORIFICIOS

2726-014-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 14 ORIFICIOS

2726-015-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 15 ORIFICIOS

2726-016-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 16 ORIFICIOS

2726-018-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 18 ORIFICIOS

2726-020-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 20 ORIFICIOS

2726-022-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 22 ORIFICIOS

2727-004-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 4 ORIFICIOS

2727-005-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2727-006-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 6 ORIFICIOS

2727-007-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS

2727-008-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 8 ORIFICIOS

2727-009-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS

2727-010-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 10 ORIFICIOS

2727-011-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 11 ORIFICIOS

2727-012-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 12 ORIFICIOS

2727-013-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 13 ORIFICIOS

2727-014-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 14 ORIFICIOS

2727-015-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 15 ORIFICIOS

2727-016-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 16 ORIFICIOS

2727-018-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 18 ORIFICIOS

2727-020-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 20 ORIFICIOS

2727-022-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 22 ORIFICIOS

2728-005-PLACA PARA OLECRANON DERECHA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2728-007-PLACA PARA OLECRANON DERECHA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS

2728-009-PLACA PARA OLECRANON DERECHA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS

2729-005-PLACA PARA HÚMERO DISTAL LATERAL POSTERIOR BLOQUEADA 3.5 mm X 5 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2729-007-PLACA PARA HÚMERO DISTAL LATERAL POSTERIOR BLOQUEADA 3.5 mm X 7 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2729-009-PLACA PARA HÚMERO DISTAL LATERAL POSTERIOR BLOQUEADA 3.5 mm X 9 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2729-011-PLACA PARA HÚMERO DISTAL LATERAL POSTERIOR BLOQUEADA 3.5 mm X 11 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2729-013-PLACA PARA HÚMERO DISTAL LATERAL POSTERIOR BLOQUEADA 3.5 mm X 13 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2730-005-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ POSTERIOR BLOQ 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2730-007-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ POSTERIOR BLOQ 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS

2730-009-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ POSTERIOR BLOQ 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS

2730-011-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ POSTERIOR BLOQ 3,5MM TITANIO X 11 ORIFICIOS

2730-013-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ POSTERIOR BLOQ 3,5MM TITANIO X 13 ORIFICIOS

2730-017-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ POSTERIOR BLOQ 3,5MM TITANIO X 17 ORIFICIOS

2735-003-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 3 ORIFICIOS

2735-005-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2735-007-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS

2735-009-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS

2735-011-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 11 ORIFICIOS

2735-013-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 13 ORIFICIOS

2735-015-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 15 ORIFICIOS

2737-004-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM 2+ TITANIO X 4 ORIFICIOS

2737-005-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM 2+ TITANIO X 5 ORIFICIOS

2738-004-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM 3+ TITANIO X 4 ORIFICIOS

2738-005-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM 3+ TITANIO X 5 ORIFICIOS

2738-006-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM 3+ TITANIO X 6 ORIFICIOS

2738-007-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM 3+ TITANIO X 7 ORIFICIOS

2738-009-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM 3+ TITANIO X 9 ORIFICIOS

2738-012-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM 3+ TITANIO X 12 ORIFICIOS

2738-013-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM 3+ TITANIO X 13 ORIFICIOS

2743-009-PLACA PARA RADIO DISTAL VP ANATOMICA BLOQUEADA 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2743-010-PLACA PARA RADIO DISTAL VP ANATOMICA BLOQUEADA 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 10 ORIFICIOS

2744-008-PLACA PARA RADIO DISTAL VP ANATOMICA BLOQUEADA 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 8 ORIFICIOS

2744-009-PLACA PARA RADIO DISTAL VP ANATOMICA BLOQUEADA 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2744-010-PLACA PARA RADIO DISTAL VP ANATOMICA BLOQUEADA 2,7/3,5MM IZQUIERDA TITANIO X 10 ORIFICIOS

2773-003-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA 2,7/3,5MM TITANIO X 3 ORIFICIOS

2773-004-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA 2,7/3,5MM TITANIO X 4 ORIFICIOS

2773-005-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA 2,7/3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2773-006-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA 2,7/3,5MM TITANIO X 6 ORIFICIOS

2775-003-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA BLOQUEADA 2,7/3,5MM TITANIO X 3 ORIFICIOS

2775-004-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA BLOQUEADA 2,7/3,5MM TITANIO X 4 ORIFICIOS

2775-005-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA BLOQUEADA 2,7/3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2775-006-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA BLOQUEADA 2,7/3,5MM TITANIO X 6 ORIFICIOS

2775-008-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA BLOQUEADA 2,7/3,5MM TITANIO X 8 ORIFICIOS

2782-005-PLACA PARA OLECRANON IZQUIERDA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2782-007-PLACA PARA OLECRANON IZQUIERDA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS

2782-009-PLACA PARA OLECRANON IZQUIERDA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS

2783-009-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL AZ EXTRA LARGA BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 9 ORIFICIOS

2783-011-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL AZ EXTRA LARGA BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 11 ORIFICIOS

2783-013-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL AZ EXTRA LARGA BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 13 ORIFICIOS

2783-015-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL AZ EXTRA LARGA BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 15 ORIFICIOS

2788-006-PLACA PARA CÚBITO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 6 ORIFICIOS

2788-008-PLACA PARA CÚBITO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 8 ORIFICIOS

2788-010-PLACA PARA CÚBITO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 10 ORIFICIOS

2788-012-PLACA PARA CÚBITO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 12 ORIFICIOS

2789-006-PLACA DORSOLATERAL PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 6 ORIFICIOS

2789-008-PLACA DORSOLATERAL PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 8 ORIFICIOS

2789-010-PLACA DORSOLATERAL PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 10 ORIFICIOS

2789-012-PLACA DORSOLATERAL PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 12 ORIFICIOS

2790-006-PLACA VOLAR PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 6 ORIFICIOS

2790-008-PLACA VOLAR PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 8 ORIFICIOS

2790-010-PLACA VOLAR PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 10 ORIFICIOS

2790-012-PLACA VOLAR PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO X 12 ORIFICIOS

2791-000-PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR CL3 BLOQUEADA CORTA 3,5MM TITANIO

2792-005-PLACA PARA OLÉCRANON OCL BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 5 ORIFICIOS

2792-007-PLACA PARA OLÉCRANON OCL BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 7 ORIFICIOS

2792-009-PLACA PARA OLÉCRANON OCL BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2818-000-PLACA PARA CUBITO RECTA BLOQUEADA 2.7MM TITANIO

2819-000-PLACA PARA CUBITO EN T BLOQUEADA 2.7MM TITANIO

2820-000-PLACA PARA CUBITO EN L BLOQUEADA 2.7MM IZQUIERDA TITANIO

2821-000-PLACA PARA CÚBITO EN L OBLICUA BLOQUEADA 2.7 MM DERECHA TITANIO

2835-003-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL PURPLE BLOQUEADA 3.5 mm X 3 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2835-005-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL PURPLE BLOQUEADA 3.5 mm X 5 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2836-003-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL PURPLE BLOQUEADA 3.5 mm X 3 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2836-005-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL PURPLE BLOQUEADA 3.5 mm X 3 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2837-000-PLACA PARA ACORTAMIENTO DE CÚBITO ULNIQUE BLOQUEADA TITANIO

2900-000-PLACA PARA CLAVICULA DISTAL CL3 DERECHA BLOQUEADA LARGA 2,7/3,5MM TITANIO

2901-000-PLACA PARA CLAVICULA DISTAL CL3 IZQUIERDA BLOQUEADA LARGA 2,7/3,5MM TITANIO

2902-000-PLACA PARA CLAVICULA MEDIAL CL3 DERECHA BLOQUEADA CORTA 3,5MM TITANIO

2903-000-PLACA PARA CLAVICULA MEDIAL CL3 IZQUIERDA BLOQUEADA CORTA 3,5MM TITANIO

2904-000-PLACA PARA CLAVICULA MEDIAL CL3 DERECHA BLOQUEADA LARGA 3,5MM TITANIO

2905-000-PLACA PARA CLAVICULA MEDIAL CL3 IZQUIERDA BLOQUEADA LARGA 3,5MM TITANIO

2906-000-PLACA PARA CLAVICULA TOTAL DERECHA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO

2907-000-PLACA PARA CLAVICULA TOTAL CL3 IZQUIERDA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO

2908-000-PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR CL3 LARGA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO

2909-000-PLACA PARA CLAVICULA DISTAL CL3 DERECHA BLOQUEADA CORTA 2,7/3,5MM TITANIO

2910-000-PLACA PARA CLAVICULA DISTAL CL3 IZQUIERDA BLOQUEADA CORTA 2,7/3,5MM TITANIO

2984-005-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 5 ORIFICIOS

2984-007-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 7 ORIFICIOS

2984-009-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2984-018-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 18 ORIFICIOS

2985-005-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 5 ORIFICIOS

2985-007-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 7 ORIFICIOS

2985-009-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2986-000-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL MEDIAL BLOQUEADA 3.5 MM 2 + 5 ORIFICIOS TITANIO

2987-005-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3.5 MM 3+ X

ORIFICIOS TITANIO X 5 ORIFICIOS

2987-007-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3.5 MM 3+ X ORIFICIOS TITANIO X 7 ORIFICIOS

2987-009-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3.5 MM 3+ X ORIFICIOS TITANIO X 9 ORIFICIOS

2987-018-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3.5 MM 3+ X ORIFICIOS TITANIO X 18 ORIFICIOS

2988-005-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL DORSO LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM DERECHA X ORIFICIOS TITANIO X 5 ORIFICIOS

2988-007-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL DORSO LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM DERECHA X ORIFICIOS TITANIO X 7 ORIFICIOS

2989-005-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL DORSO LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM IZQUIERDA X ORIFICIOS TITANIO X 5 ORIFICIOS

2989-007-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL DORSO LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM IZQUIERDA X ORIFICIOS TITANIO X 7 ORIFICIOS

2996-003-PLACA TRACER BLOQUEADA 3.5 / 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO IZQUIERDA X 3 ORIFICIOS

2996-004-PLACA TRACER BLOQUEADA 3.5 / 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO IZQUIERDA X 4 ORIFICIOS

2996-005-PLACA TRACER BLOQUEADA 3.5 / 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO IZQUIERDA X 5 ORIFICIOS

2997-003-PLACA TRACER BLOQUEADA 3.5 / 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO DERECHA X 3 ORIFICIOS

2997-004-PLACA TRACER BLOQUEADA 3.5 / 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO DERECHA X 4 ORIFICIOS

2997-005-PLACA TRACER BLOQUEADA 3.5 / 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO DERECHA X 5 ORIFICIOS

3218-003-PLACA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC 2.4 / 3.5 MM X ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 3 ORIFICIOS

3218-004-PLACA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC 2.4 / 3.5 MM X ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 4 ORIFICIOS

3218-005-PLACA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC 2.4 / 3.5 MM X ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 5 ORIFICIOS

3219-003-PLACA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC 2.4 / 3.5 MM X ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 3 ORIFICIOS

3219-004-PLACA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC 2.4 / 3.5 MM X ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 4 ORIFICIOS

3219-005-PLACA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC 2.4 / 3.5 MM X ORIFICIOS IZQUIERDA
TITANIO X 5 ORIFICIOS

INSTRUMENTAL ASOCIADO

Periodo de vida útil: no corresponde.

Forma de presentación: envasados individualmente.

Método de esterilización: NO ESTÉRIL.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A.

Lugar/es de elaboración: Perito Moreno 845, UF 1 a 3 y de 22 a 28, Parque Industrial Canning, Ezeiza,
Provincia de Bs. As.

Expediente N° 1-47-3110-7759-17-2

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2016.03.22 09:32:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30716117584
Date: 2016.03.22 09:32:59 -0300

PROYECTO DE RÓTULO: PM 2022-47
PLACAS DE OSTEOSÍNTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR TITANIO

Gráfica de Rótulo

MARCA

Fabricado por: South America Implants S.A.
París Moreno 842, CABA
Provincia de Buenos Aires, Industria Argentina
Tel: (011) 5580-4574
Director Técnico: Parm. Alejandro Giordanengo MP 19972

PLACAS DE OSTEOSÍNTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR TITANIO
MODELO XXX
Autorizado por la ANMAT PM-2022-47
PRODUCTO MÉDICO DE UN SOLO USO
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

METODO DE ESTERILIZACIÓN SUGERIDA: Esterilización controlada a vacío previo (HI-VAC) con envoltorio. (Tiempo de exposición: 4 min., Temperatura: 132°C., Tiempo de secado: 30 min. (Mínimo)).

ALMACENAMIENTO: Los productos deben almacenarse en el lugar habitual destinado al almacenaje de los implantes a temperatura menor de 40° y humedad menor a 60%.

LOT XXXX ☀ ☂ 📖 📏 aaaa-mm
NO ESTÉRIL REF AAAA-BBB ② 1 Unidad



A A A A G B B I L X X X X

- * "XXXX" Corresponde al número de lote de la Producción
- * "AAAA-BBB" Corresponde Código de Referencia del Producto médico
- * "aaaa-mm" Corresponde a la Fecha de Fabricación


MATIAS CRESCENTE
Presidente
South America Implants S.A.

Alejandro Giordanengo
M.P. 19972
Director Técnico
South America Implants S.A.

PROYECTO DE RÓTULO: PM 2022-47

SISTEMA DE OSTEOSÍNTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR TITANIO
INSTRUMENTAL ESPECÍFICO

- * "XXXX" Corresponde al número de lote de la Producción
- * "AAAA-BBB" Corresponde Código de Referencia del Producto
- * "aaaa-mm" Corresponde a la Fecha de Fabricación

MARCA	 <p>Fabricado por: South America Implants S.A. Perito Moreno 845, Estiba Provincia de Buenos Aires, Industria Argentina Tel: (011) 5308-1574 Director Técnico: Farm. Alejandro Giordanengo MP 13972</p>
-------	--

**SISTEMA DE OSTEOSÍNTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR TITANIO
INSTRUMENTAL ESPECÍFICO**

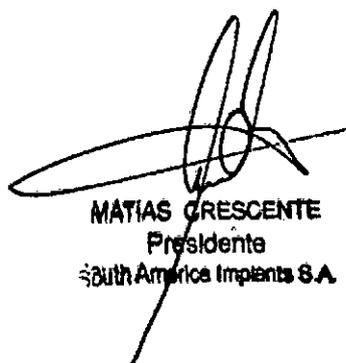
MODELO

Autorizado por la ANMAT PM-2022-47
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

METODO DE ESTERILIZACIÓN SUGERIDA: Esterilizador sometido a vacío previo (HI-VAC) con envoltorio. (Tiempo de exposición: 4 min., Temperatura: 132°C., Tiempo de secado: 30 min. (Mínimo)).

ALMACENAMIENTO: Los productos deben almacenarse en el lugar habitual destinado al almacenaje de los implantes a temperatura menor de 40° y humedad relativa < 80%.

LOT XXXX					aaaa-mm
NO ESTÉRIL	REF	AAAA-BBB		1	Unidad


MATIAS CRESCENTE
Presidente
South America Implants S.A.


Alejandro Giordanengo
MP 13972
Director Técnico
South America Implants S.A.

PLACAS DE OSTEOSÍNTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR TITANIO

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

Fabricado por: SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A., Av. Perito Moreno 845, Parque Privado Canning Industrial, Unidades Funcionales 1 a 3 y de 22 a 28, Parque Industrial Canning, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Tel: (011) 5368-1574/9084/1890

Director técnico: Farm. Alejandro Giordanengo MP 13972

Modelo: ver en rótulo.

Autorizado por la ANMAT PM- 2022-47

Producto médico de un sólo uso. No estéril. Esterilizar previo a la implantación mediante un método validado, se sugiere la esterilización por vapor. Asegúrese de estar familiarizado con los usos pretendidos, indicaciones /contraindicaciones, compatibilidad y manipulación correcta del implante, que se encuentran descriptos en estas Instrucciones de Uso.

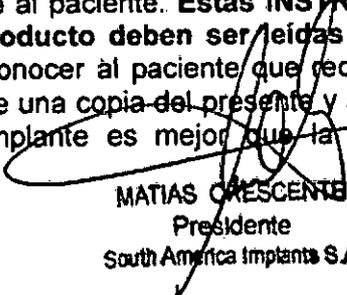
Condición de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

GENERALIDADES

Estos productos deben ser implantados por profesionales capacitados que conozcan las técnicas brindadas por la Empresa para la utilización de cada uno de ellos. La información actualizada para implantar los mismos se puede obtener a través de nuestros catálogos o bien ser requerida a nuestra Empresa directamente, incluso en casos especiales. SOUTH AMERICA IMPLANTS no se responsabiliza por cualquier efecto ni consecuencias que pudieran resultar del apartamiento de esas técnicas o instrucciones específicas, como ser una equivocada indicación o mala utilización de la técnica quirúrgica o problemas de asepsia, siendo esta enumeración no taxativa. Todos los procedimientos y técnicas quirúrgicas son responsabilidad y privativos del médico. Sin embargo la Empresa excluye de la garantía el uso de un producto para una indicación no aconsejada en la práctica médica.

Los implantes han sido diseñados como un conjunto integral aunque permiten realizar variantes a condición de que se respete la compatibilidad dimensional de las piezas y de los materiales. Están garantizadas las variantes que sean realizadas con productos fabricados por SOUTH AMERICA IMPLANTS. En ningún caso podrán ser combinados con productos fabricados por otra Empresa.

En caso de combinar productos de fabricación propia con productos no autorizados por SOUTH AMERICA IMPLANTS, caducará automáticamente la garantía del producto utilizado. Ésta u otras circunstancias deben asentarse en la Historia Clínica e informarse al paciente. **Estas INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN que se incluyen con el producto deben ser leídas atentamente por el médico cirujano y deben darse a conocer al paciente que recibirá el implante debiendo el médico justificar la entrega de una copia del presente y asentar dicha circunstancia en la Historia Clínica.** Ningún implante es mejor que la estructura ósea humana. Los implantes están


MATIAS CRESCENTE
Presidente
South America Implants S.A.

fabricados con material biocompatible. El mismo se especifica en el rótulo reglamentario y en las tarjetas de implante del producto.

El peso del paciente y su nivel de actividad son factores fundamentales que afectan la vida y el desempeño del implante. El paciente DEBE ser instruido por parte del médico cirujano acerca de estos factores así como las restricciones a las que se verá sometido él en la etapa postoperatoria. Los implantes pueden fallar o presentar complicaciones en los siguientes casos:

- Pacientes con expectativas funcionales irrealistas.
- Pacientes de elevado peso.
- Pacientes físicamente activos.

Para mayor información por favor lea las **CONTRAINDICACIONES**.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

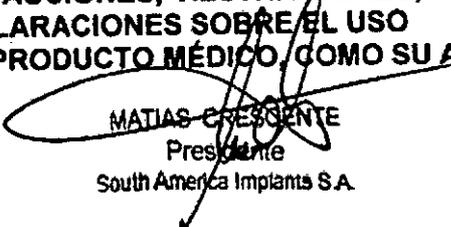
IMPORTANTE: No utilizar jamás un implante que haya sido usado previamente. No efectuar ninguna modificación al implante salvo encasos indicados por la técnica quirúrgica. Antes de la implantación verificar que el implante no posea suciedad, marcas, golpes o rayaduras, especialmente en las zonas de fricción y elementos de unión. Cualquiera de estos procedimientos puede causar el daño alacabado de su superficie, produciendo como consecuencia concentración de tensiones que pueden llegar a ser el punto de fractura del implante. Respecto a los detalles técnicos que conciernen a la implantación propiamente dicha, el cirujano deberá referirse a la técnica quirúrgica. SOUTH AMERICA IMPLANTS cuenta con material técnico y personal capacitado que podrá asistirlo para implantar con éxito el producto. NUNCA inicie el acto quirúrgico sin antes realizar una minuciosa planificación preoperatoria ya que la falta de planificación puede ocasionar la mala selección del componente a implantar o la falla en el abordaje del área a operar. Los productos explantados deben desecharse previa limpieza y descontaminación de los mismos.

INDICACIONES PREVISTAS (USO PREVISTO)

Las Placas de Osteosíntesis para Miembro Superior elaboradas por SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A. están indicadas en configuraciones de fracturas que sean susceptibles al tratamiento del sistema de placas de fijación (Placas para Clavícula: fracturas diafisarias y periarticulares, fracturas del extremo distal con o sin luxación acromioclavicular, Placas para Escápula: Fracturas del cuerpo y acromion. Fracturas con compromiso de la cavidad glenoidea, Placas para Húmero: proximales; Fracturas de la cabeza humeral en 1, 2, 3, y 4 fragmentos, Distales; fracturas de paleta humeral de una o dos columnas, fracturas diafisarias y periarticulares, fracturas de epitroclea y epicóndilo. Placas para Radio: fracturas que afectan la diáfisis y las regiones periarticulares incluyendo radio distal, muñeca y cúpula radial, Proximal; fracturas intraarticulares de la cúpula radial, Distal; fracturas intra o extraarticulares en la región de la muñeca. Placas para Cúbito: fracturas diafisarias, periarticulares del cúbito incluido el olécranon y la estiloides, Distal; fractura de estiloides, Olécranon: fracturas intraarticulares del Olécranon), donde el tamaño, forma y localización del hueso fracturado sean apropiados para la utilización de una placa para la fijación y estabilización de una Fractura.

ADVERTENCIAS AL PACIENTE

PRECAUCIONES, RESTRICCIONES, ADVERTENCIAS, CUIDADOS ESPECIALES Y ACLARACIONES SOBRE EL USO DEL PRODUCTO MÉDICO, COMO SU ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.


MATIAS CRESCENTE
Presidente
South America Implants S.A.

IF-2018-07632950-APN-DNPM#ANMAT

Alejandro Giordano
M.P. 13972
Director Técnico
South America Implants S.A.

CONTRAINDICACIONES

- Infecciones sistémicas o locales, crónicas o agudas.
- Pacientes con enfermedades mentales o neurológicas que no deseen o sean incapaces de seguir instrucciones.
- Pacientes que presenten reacciones de sensibilidad a las aleaciones metálicas que componen los dispositivos médicos.
- Pacientes con calidad o cantidad insuficiente de hueso o tejido fibroso para permitir su remodelado.

IMPORTANTE: El médico cirujano debe considerar potenciales contraindicaciones en pacientes con alteraciones neurológicas que no sean capaces de cumplir las indicaciones posquirúrgicas así como aquellos con pérdida ósea acusada, alteraciones metabólicas, tabaquistas, úlceras, pacientes diabéticos, déficit de nutrición y déficit severo de proteínas. Todos estos factores ponen en riesgo la funcionalidad e integridad del implante. Los pacientes **DEBEN SER ADVERTIDOS DE ESTAS CONTRAINDICACIONES.**

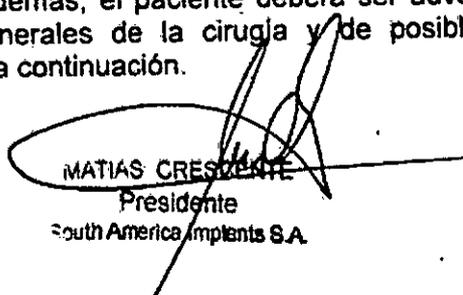
ADVERTENCIAS

En caso de que se observen adecuadas señales de un cambio de forma, se deberá proceder a retirar el dispositivo. Dicho procedimiento deberá ser seguido de un período de supervisión postoperatoria para verificar si se presenta una reaparición de la deformidad. En caso de que ello suceda, posiblemente resulte necesario aplicar un tratamiento secundario o alternativo. Aunque el implante parezca estar intacto, es posible que presente imperfecciones, defectos o zonas de desgaste internas, a consecuencia de lo cual puede llegar a romperse o fallar en su rendimiento.

Para la implantación de los componentes la técnica quirúrgica debe ser la correcta y se debe utilizar el instrumental apropiado fabricado por SOUTH AMERICA IMPLANTS, de lo contrario la utilización de cualquier otro instrumento no fabricado por SOUTH AMERICA IMPLANTS puede dar lugar a su incorrecta implantación, pudiendo afectar la vida útil de los componentes protésicos. No se aconseja el uso de instrumentos electro-quirúrgicos o láser en zonas cercanas al implante o los conectores metálicos debido al riesgo de transmisión eléctrica que puede provocar necrosis ósea y alteración de la osteointegración.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

El cuidado y la supervisión postoperatorios son importantes. Los dispositivos de fijación metálicos no son capaces de soportar los niveles de actividad ni las cargas que soporta una persona sana. El implante se puede aflojar, desplazar doblar, o quebrar si se lo somete a soportar peso a cargas, a actividades muy intensas o lesiones traumáticas. El cirujano tratante debe advertir al paciente de la necesidad de limitar sus actividades de la manera correspondiente. La limitación de las actividades físicas puede ser particular a cada paciente y éste debe ser advertido que de no cumplir con las instrucciones postoperatorias que se le den podría dar lugar a las complicaciones antes explicadas. El paciente debe ser informado y advertido de que la deformidad puede permanecer presente en su totalidad o en cierto grado aún después de la cirugía. Además, el paciente deberá ser advertido, antes de la intervención, de los riesgos generales de la cirugía y de posibles efectos adversos, tal y como se enumeran a continuación.


MATIAS CRESCENTE
Presidente
South America Implants S.A.

Alejandro Gordanengo
MIP 13972
Diputado Técnico
South America Implants S.A.
IF-2018-07632950-APB/18-11-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-24

EFFECTOS ADVERSOS

1. Reacciones debidas a sensibilidad a los metales o reacción alérgica al material del implante.
2. Dolor, molestia o sensación anormal debidos a la presencia del dispositivo.
3. Trauma quirúrgico; lesión neural permanente o temporal, lesión permanente o temporal de estructuras o tejidos del cuerpo.
4. Irritación dérmica e infección.
5. Unión retardada o falta de unión, lo que puede conducir a la ruptura del implante.
6. Fractura, ruptura, desplazamiento o aflojamiento del implante.
7. Corrección incompleta o inadecuada de la deformidad o reaparición de la misma, después de retirarse el implante en los casos de retiro de material de osteosíntesis.
8. Lesiones permanentes o la muerte.

La implantación de materiales extraños en los tejidos puede ocasionar reacciones histológicas involucrando macrófagos y fibroblastos. La significación clínica actual de estos efectos es incierta dado que cambios similares pueden ocurrir durante el proceso normal de curado de la herida. Reacciones de sensibilidad de los pacientes a las bioaleaciones siguientes a la intervención raramente han sido reportadas. La infección del sitio implantado puede ser seria y debe ser tratada de forma inmediata ya que de no ser así puede llevar a una osteomielitis e incluso llegar a la amputación del miembro afectado. Algunos de estos efectos adversos pueden requerir una nueva cirugía, la remoción del implante y la posterior implantación de un nuevo implante.

ESTERILIZACIÓN

NO-ESTÉRIL. El producto debe ser esterilizado previo ser implantado por un método y ciclo validado por la institución de Salud. Se sugiere la esterilización por vapor. NO está permitida la reesterilización/reuso de estos productos. La apertura del embalaje de estos productos debe ser realizada en la sala del centro quirúrgico, utilizando guantes estériles y por instrumentador capacitado. La integridad del embalaje debe ser mantenida hasta el momento de la apertura por la enfermera circulante de sala. Durante el acto quirúrgico, el cirujano no debe usar fuerza excesiva para evitar dañar la superficie del producto, pues puede comprometer el desempeño del dispositivo.

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

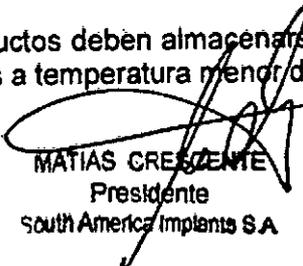
Cada producto lleva grabado en su superficie un número de lote que coincide con el impreso en la etiqueta del envase.

Este número deberá agregarse a la historia clínica del paciente y a la tarjeta de implante valiéndose de la etiqueta autoadhesiva adjunta.

La comunicación de este número es condición de esta garantía pues nos permite rastrear la historia de cada implante desde la fabricación, incluida la materia prima, hasta la fecha de liberación al mercado.

ALMACENAMIENTO

Los productos deben almacenarse en el lugar habitual destinado al almacenaje de los implantes a temperatura menor de 40°C y humedad menor a 80%.


MATIAS CRESCENTE
Presidente
South America Implants S.A.

Alejandro Giordanengo
13972
IF-2018-07632950-A
Director Comercial
South America Implants S.A.
página 6 de 11

RECOMENDACIONES REFERENTES A LA CIRUGÍA

Los quirófanos deberán ser asépticos para evitar la infección del implante que, en la mayoría de los casos, conlleva a la revisión del mismo generando secuelas en el paciente. La cirugía deberá ser planeada cuidadosamente conforme a los resultados radiológicos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULEO DEL INSTRUMENTAL

El instrumental se ha ideado específicamente para permitir la colocación del implante. **Se entrega sin esterilizar.**

Extremar las precauciones al manipular instrumentos afilados para evitar lesiones: evitar la aplicación de una tensión o presión indebida al manipular o limpiar los instrumentos. Utilizar guantes protectores durante la limpieza y consultar a un especialista en control de infecciones para desarrollar y verificar los procedimientos de seguridad adecuados para todos los niveles de contacto directo con los instrumentos. A menos que se indique lo contrario, los instrumentos NO son estériles y deben esterilizarse antes de su uso. Las cajas de instrumentos sin envoltorio NO conservan la esterilidad.

CONTRAINDICACIONES

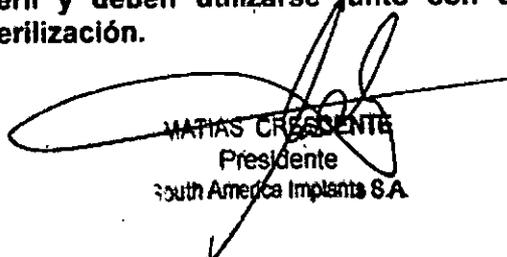
Los instrumentos no están diseñados para ser utilizados cuando existan uno o más de los siguientes trastornos:

- Trastornos patológicos del tejido que se desea tratar.
- Trastornos físicos que podrían retardar la cicatrización, como irrigación sanguínea restringida e infección.
- Trastornos que podrían limitar la capacidad o el deseo del paciente de cumplir con las instrucciones durante el período de cicatrización.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Las cajas de instrumentos que se hayan procesado y envuelto para conservar la esterilidad deben almacenarse de manera que eviten temperaturas extremas y la humedad. Debe tenerse cuidado al manipular cajas con envoltorio para no dañar la barrera estéril y/o indicador químico. El centro médico sanitario debe establecer un tiempo de conservación para las cajas de instrumentos con envoltorio basándose en el tipo de envoltorio estéril utilizado y las recomendaciones del fabricante de dicho envoltorio. El usuario debe tener en cuenta que la conservación de la esterilidad depende de muchos factores y que la probabilidad de que se produzca una contaminación aumenta con el tiempo y la manipulación, ya sea que se utilicen materiales entretejidos o no, bolsas o sistemas de depósito como método de embalaje. El instrumental quirúrgico no debe almacenarse en zonas que contengan productos químicos que desarrollen vapores corrosivos.

¡Importante! Los contenedores de instrumentos no proporcionan una barrera estéril y deben utilizarse junto con un envoltorio estéril para conservar la esterilización.


MATIAS CRESCENTE
Presidente
South America Implants S.A.

Alejandro Giordanengo
MIF 13972
IF-2018-07632950-APN/DINP/ANMAT
Director de Inspección
South America Implants S.A.

NO PERMITIR QUE SE SEQUEN LOS INSTRUMENTOS QUE SE HAYAN ENSUCIADO: Sumergirlos o bien utilizar toallas empapadas en agua desionizada o destilada para mantener humedecidos los instrumentos que se hayan ensuciado antes de su limpieza. En el caso de instrumentos contaminados con sangre y fluidos corporales (por ejemplo, proteínas) se recomienda el uso de un producto enzimático o una limpieza ultrasónica siguiendo las recomendaciones del fabricante para facilitar la limpieza. Se recomienda una limpieza mecánica (es decir, una lavadora-desinfectadora de instrumental) mediante un equipo diseñado para dispositivos médicos. Deben utilizarse las lavadoras-desinfectadoras automáticas conforme a lo indicado por el fabricante de las mismas. Los instrumentos complejos, como los que tienen tubos, articulaciones, características retráctiles y superficies con acabado mate o texturado, requieren especial atención para su limpieza. Se requiere la limpieza previa manual de estas características antes del procesamiento de limpieza automático.

¡Advertencia! Este dispositivo lo debe manipular únicamente el cirujano/traumatólogo entrenado en la(s) técnica(s) quirúrgica(s) específica(s).

Precauciones para los instrumentos reutilizables y las cajas:

Todos los instrumentos y cajas deben inspeccionarse regularmente para determinar si presentan desgaste o desfiguración. **NO UTILIZAR** instrumentos o cajas que estén desfigurados, rajados, corroídos o dañados de cualquier otra forma. No intente enderezar, afilar ni reparar los instrumentos. Deséchelos de forma adecuada.

DESCONTAMINACIÓN, LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

Después de su utilización, el usuario debe descontaminar, limpiar y esterilizar correctamente los instrumentos. Estos tratamientos se desarrollan teniendo en cuenta la siguiente información: Los dispositivos se sumergen en un producto descontaminante, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante del producto. Todas las superficies, sobre todo las cavidades y las zonas de acceso más difícil, deben estar en contacto con la solución. A fin de facilitar la limpieza, puede utilizarse también papel tisú suave, sin pelusa, con un producto de limpieza no abrasivo y con agua tibia. Después de un enjuagado con abundante agua desionizada, se procede a la limpieza de cada pieza, respetando las instrucciones del fabricante del agente de limpieza. A continuación, es necesario un enjuague abundante de las piezas a fin de eliminar todos los residuos de limpieza. Para evitar manchas de agua, se recomienda usar, en el primer enjuague, agua destilada o desmineralizada. En el transcurso de estos procedimientos, debe vigilarse que los instrumentos metálicos no estén en contacto con soluciones corrosivas. No debe haber contacto entre el acero inoxidable, los productos halogenados y con aluminio, y los productos alcalinos. A continuación secar minuciosamente los instrumentos, con paños suaves y bien absorbentes, o con una corriente de aire caliente o bien con aire comprimido. A continuación, los instrumentos deben separarse inmediatamente en recipientes a fin de evitar cualquier riesgo de nueva contaminación. Se aconseja esterilizarlos después en los recipientes, con vapor de agua en autoclave, siguiendo un protocolo validado (se sugiere, por ejemplo: 132°C - 4 minutos). La esterilización no sustituye la limpieza. Los instrumentos deben limpiarse bien antes de proceder a su esterilización. Inmediatamente después de su uso, los instrumentos deben descontaminarse, limpiarse y esterilizarse, respetando las instrucciones mencionadas.

Instrucciones de limpieza para lavadoras-desinfectadoras automáticas y detergentes:

1. Desmontar los instrumentos reutilizables retirándolos del dispositivo de mano motorizado según el procedimiento adecuado.

MATIAS CRESCENTE
Presidente
South America Implants S.A.

IF-2018-07632950-APN/DX/17/AANMAT
Alejandro Giordanengo
Director Técnico
South America Implants S.A.

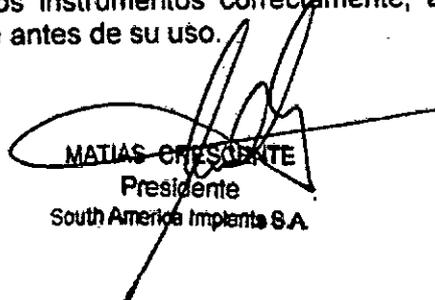
2. Enjuagarlos a mano: Eliminar la contaminación más sólida de todos los instrumentos que se hayan ensuciado con agua potable a una temperatura de unos 20°C (±5°C), utilizando un cepillo de nylon para frotar todos los residuos de proteínas. Asimismo, se deben comprobar todas sus funciones. Los instrumentos y bandejas de aluminio anodizado son susceptibles a las soluciones ácidas y alcalinas. Comprobar el nivel de pH del detergente para asegurarse de que no sea superior a 7; si no, puede producirse una pérdida de los colores y/o decoloración.
3. Ciclo de lavado: Antes de comenzar el proceso, el operador deberá verificar la limpieza y funcionamiento correctos de los equipos de ultrasonido, y que los mismos contengan la solución de limpieza. SOUTH AMERICA IMPLANTS recomienda utilizar un detergente que no deje residuos siguiendo las instrucciones del fabricante, por ejemplo, SURGIZIME E2 a una concentración de 8 ml/litro de agua potable a 60°C (-5°C). Tiempo mínimo del ciclo: 7 minutos. Terminados los 7 minutos retirar de la lavadora ultrasónica los implantes y el instrumental.
4. Enjuague final: NO UTILIZAR agentes limpiadores durante este ciclo final. Después del ciclo de lavado, sigue un ciclo de enjuague final mediante agua corriente durante un mínimo de 2 minutos. En este paso, si aún hubiera restos visibles de suciedad, retirarlos con un paño que no deje pelusas embebido en alcohol 70°.
5. Inspección visual: Al finalizar los pasos anteriores, inspeccionar visualmente los productos para asegurarse de que estén "visiblemente limpios". Si no fuera así, repetir los pasos de limpieza anteriores.
6. Cargar la caja de cirugía: Después de realizar el ciclo de lavado como se describió en los pasos anteriores, deben colocarse los productos en la caja de cirugía adecuada. Asegurarse de que las tapas de las cajas están cerradas correctamente. Si la tapa de la caja no se cierra, esto significa que está sobrecargada. Retirar el exceso de instrumentos y cerrar la tapa del contenedor.
7. Aclaración para el instrumental en Micarta: Los mangos se lavarán con agua oxigenada, alcohol y el uso de aire comprimido. En el caso de los productos canulados (instrumental o implantes), introducir una broca o clavija roscada para retirar por completo residuos que pudieran quedar en el interior. Verificar mirando a trasluz que no quede ningún residuo.

NOTAS:

I.- ANTES DE SU DEVOLUCIÓN TODOS LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS DEBEN PASAR POR UN PROCESO INTENSIVO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD.

II.- Pueden aparecer manchas en los instrumentos que se esterilicen mediante vapor si éstos no se enjuagan completamente o no se eliminan todos los residuos químicos. Es esencial que se sigan los ciclos de secado adecuados y las recomendaciones del fabricante del equipo para evitar la formación de una humedad excesiva y posteriores manchas de agua. Deben esterilizarse los instrumentos antes de cada intervención quirúrgica. Los usuarios individuales deben validar los procedimientos de limpieza y autoclave utilizados in situ, incluida la validación de los parámetros del ciclo mínimo recomendado que se describen a continuación.

III.- El instrumental quirúrgico puede esterilizarse en autoclave mediante un ciclo completo. Deben lavarse los instrumentos que se hayan utilizado en el quirófano de manera minuciosa antes de esterilizarlos en autoclave. Debe evitarse la esterilización en autoclave-flash siempre que sea posible. Las cajas de cirugía en préstamo suministradas se limpiaron e inspeccionaron rigurosamente y se ha comprobado que funcionan los instrumentos correctamente; antes de su envío. No obstante, deben esterilizarse antes de su uso.


MATIAS CRESCENTE
Presidente
South America Implants S.A.

Alejandro Giordano
M.P. 13672
IF-2018-07632950-APN/ADM#ANMAT
Director
South America Implants S.A.

ESTERILIDAD

Tanto los implantes como el instrumental asociado se entrega en estado no-estéril. SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A. sugiere la esterilización por vapor. Para eso, se aplican las disposiciones del apartado "MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN" que sigue a continuación.

MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN

Antes de cada intervención quirúrgica esterilizar el instrumental asociado. Los implantes que no se utilicen pueden volver a esterilizarse previo descontaminación y limpieza. A continuación se indica un ciclo mínimo para realizar la esterilización. Los usuarios individuales deben validar los procedimientos de limpieza y autoclave utilizados in situ, incluyendo la validación de los parámetros de ciclo mínimo recomendado descriptos a continuación.

Parámetros de esterilización a vacío:

Esterilizador sometido a vacío previo (HI-VAC) con envoltorio

- Tiempo de exposición: 4 minutos.
- Temperatura: 132°C.
- Tiempo de secado: 30 minutos (mínimo).

El personal sanitario tiene la responsabilidad final de asegurarse de que cualquier método de embalaje o material, incluido un sistema de depósito reutilizable rígido, es apropiado para su uso en el proceso de esterilización y el mantenimiento de la esterilización en la instalación médico-sanitaria.

Se deben hacer pruebas y ensayos en el centro médico sanitario para garantizar las condiciones para la esterilización, dado que SOUTH AMERICA IMPLANTS desconoce los métodos de utilización, los procedimientos de higiene sanitaria y la población microbiológica de cada centro de salud, por lo que no puede garantizar la esterilidad del producto, aun cuando se sigan estas instrucciones.

DESCARTE DE PRODUCTOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL:

Las Instituciones Sanitarias deberán atenerse a lo indicado por las ordenanzas municipales de donde se hallen emplazadas las mismas.

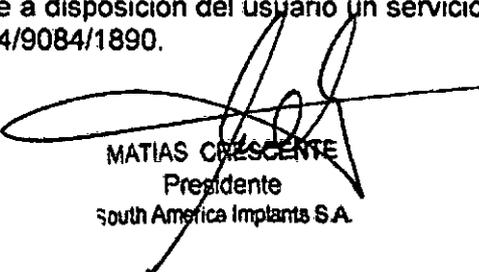
Independientemente de ello, los productos deberán ser descontaminados de modo seguro para luego ser desechados en recipientes para residuos patológicos."

NORMAS UTILIZADAS PARA LA FABRICACIÓN DEL SISTEMA

Todos nuestros productos están fabricados sobre la base de las especificaciones dadas por normas en vigencia con los materiales testeados y reconocidos, que responden a normas del Instituto Argentino de Normalización (IRAM) y a sus equivalentes internacionales: International Organization for Standardization (ISO) y American Society for Testing Materials (ASTM).

SERVICIO AL CONSUMIDOR

La Empresa pone a disposición del usuario un servicio de atención a través de la línea (5411) 5368-1574/9084/1890.


MATIAS CRÉSCENTE
Presidente
South America Implants S.A.

Alfredo Giordano
M. P. 13178
IF-2018-07692939-APN-DNPM#ANMAT
Director Técnico
South America Implants S.A.
página 10 de 11

SÍMBOLOS

NO ESTERIL

PRODUCTO NO ESTERIL



ATENCIÓN: LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO.



ÚNICO USO



MANTENER SECO

LOT

LOTÉ N°

REF

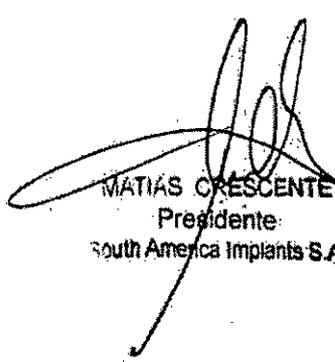
REFERENCIA/CÓDIGO/CATALOGO N°



FECHA DE FABRICACION



MANTENER ALEJADO DEL CALOR


MATÍAS CRESCENTE
Presidente
South America Implants S.A.


Alejandro Jordarengo
M.P. 11872
Director Técnico
South America Implants S.A.

IF-2018-07632950-APN-DNPM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-07632950-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 20 de Febrero de 2018

Referencia: 1-47-3110-7759-17-2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.20 12:01:17 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.02.20 12:01:18 -03'00'



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-47-3110-7759-17-2

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Placas de osteosíntesis para miembro superior titanio.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-050 -Placas, para huesos.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): SAI®, AS®, NOBLE®, CONTACTLESS®, PRO ANATOMIC®

Clase de Riesgo: III.

Indicación/es autorizada/s: indicadas en configuraciones de fracturas que sean susceptibles al tratamiento del sistema de placas de fijación (Placas para Clavícula: fracturas diafisarias y periarticulares, fracturas del extremo distal con o sin luxación acromioclavicular, Placas para Escápula: Fracturas del cuerpo y acromion. Fracturas con compromiso de la cavidad glenoidea, Placas para Húmero: proximales; Fracturas de la cabeza humeral en 1, 2, 3, y 4 fragmentos, Distales; fracturas de paleta humeral de una o dos columnas, fracturas diafisarias y periarticulares, fracturas de epitroclea y epicóndilo, Placas para

1

Radio: fracturas que afectan la diáfisis y las regiones periarticulares incluyendo radio distal, muñeca y cúpula radial, Proximal; fracturas intraarticulares de la cúpula radial, Distal: fracturas intra o extraarticulares en la región de la muñeca, Placas para Cúbito: fracturas diafisarias, periarticulares del cúbito incluido el olécranon y la estiloides, Distal; fractura de estiloides, Olécranon: fracturas intraarticulares del Olécranon), donde el tamaño, forma y localización del hueso fracturado sean apropiados para la utilización de una placa para la fijación y estabilización de una Fractura.

Modelo/s:

OPF-00-CR00-T-O-3.5 COMUN EN TITANIO CON PLACAS DE RECONSTRUCCION

OPF-00-BDL0-T-O-3.5 BLOQUEADA EN TITANIO BAJO CONTACTO

OPF-00-BRD1-T-O-3.5 BLOQUEADA EN TITANIO (DUO)

OPF-00-BR02-T-O-3.5 BLOQUEADA EN TITANIO CON PLACAS DE RECONSTRUCCION (DUO)

0HN-02-0000-T-O-PLACA PRO ANATOMIC

0AM-00-0000-T-O-ARTRODESIS DE MUÑECA EN TITANIO BLOQUEADA

0HP-00-0000-T-O-PHILO EN TITANIO

0HP-00-XL00-T-O-PLACA PHILO EN TITANIO EXTRA LARGA MOD

0HP-00-TORX-T-O-PHILO TORX EN TITANIO

0HN-00-0000-T-O-VOLAR SIMPLE Y DOBLE HILERA EN TITANIO STANDARD

0HD-00-0000-T-O-PLACAS DE OLECRANON Y HUMERO DISTAL OCL CSS

CRP-00-0000-T-O-PLACA PARA CUPULA RADIAL 2.7 BLOQUEADA EN TITANIO

CRP-00-0000-T-B-IMPLANTES DE CUPULA RADIAL - MALETIN

0CL-00-0000-T-O-CLAVICULA

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

0AB-01-0000-T-O-PLACAS DE ANTEBRAZO CSS TORNILLERA

0AB-02-0000-T-O-SISTEMA ANTEBRAZO (AS - AB2)

XPF-00-BTRD-T-O-3.5 BLOQUEADA EN TITANIO CON PLACAS DE
RECONSTRUCCION Y DCP DUO

XPF-00-BTR0-T-O-3.5 COMUN EN TITANIO CON PLACAS DE RECONSTRUCCION

0504-003-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM
TITANIO X 3 ORIFICIOS

0504-004-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM
TITANIO X 4 ORIFICIOS

0504-005-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM
TITANIO X 5 ORIFICIOS

0504-006-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM
TITANIO X 6 ORIFICIOS

0504-007-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM
TITANIO X 7 ORIFICIOS

0504-008-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM
TITANIO X 8 ORIFICIOS

0504-009-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM
TITANIO X 9 ORIFICIOS

0504-010-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM
TITANIO X 10 ORIFICIOS

1

0504-012-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM
TITANIO X 12 ORIFICIOS

0504-014-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM
TITANIO X 14 ORIFICIOS

0504-016-PLACA RECTA DCP BAJO CONTACTO RC2 BLOQUEADA 3.5 MM
TITANIO X 16 ORIFICIOS

0573-002-PLACA PARA CÚPULA RADIAL BLOQUEADA 2.7 MM X ORIFICIOS
TITANIO X 2 ORIFICIOS

0573-003-PLACA PARA CÚPULA RADIAL BLOQUEADA 2.7 MM X ORIFICIOS
TITANIO X 3 ORIFICIOS

2302-003-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
3 ORIFICIOS

2302-004-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
4 ORIFICIOS

2302-005-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
5 ORIFICIOS

2302-006-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
6 ORIFICIOS

2302-007-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
7 ORIFICIOS

2302-008-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
8 ORIFICIOS

2302-009-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
9 ORIFICIOS

7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2302-010-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
10 ORIFICIOS

2302-011-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
11 ORIFICIOS

2302-012-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
12 ORIFICIOS

2302-013-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
13 ORIFICIOS

2302-014-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
14 ORIFICIOS

2302-015-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
15 ORIFICIOS

2302-016-PLACA RECTA DCP DUO BLOQUEADA 3,5 MM X ORIFICIOS TITANIO X
16 ORIFICIOS

2334-003-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM DERECHA
TITANIO X 3 ORIFICIOS

2334-004-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM DERECHA
TITANIO X 4 ORIFICIOS

2334-005-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM DERECHA
TITANIO X 5 ORIFICIOS

2334-008-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM DERECHA
TITANIO X 8 ORIFICIOS

1

2335-003-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM IZQUIERDA
TITANIO X 3 ORIFICIOS

2335-004-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM IZQUIERDA
TITANIO X 4 ORIFICIOS

2335-005-PLACA PARA RADIO DISTAL VP BLOQUEADA 2.7/3.5MM IZQUIERDA
TITANIO X 5 ORIFICIOS

2347-003-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 3
ORIFICIOS

2347-004-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 4
ORIFICIOS

2347-005-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 5
ORIFICIOS

2347-007-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 7
ORIFICIOS

2347-009-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 9
ORIFICIOS

2347-011-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 11
ORIFICIOS

2347-013-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM DERECHA TITANIO X 13
ORIFICIOS

2348-003-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 3
ORIFICIOS

2348-004-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 4
ORIFICIOS





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2348-005-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 5
ORIFICIOS

2348-007-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 7
ORIFICIOS

2348-009-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 9
ORIFICIOS

2348-011-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 11
ORIFICIOS

2348-013-PLACA PARA RADIO DISTAL HI 2.7/3.5MM IZQUIERDA TITANIO X 13
ORIFICIOS

2349-007-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X
ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 7 ORIFICIOS

2349-009-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X
ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2349-011-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X
ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 11 ORIFICIOS

2349-013-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X
ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 13 ORIFICIOS

2350-007-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X
ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 7 ORIFICIOS

2350-009-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X
ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 9 ORIFICIOS

1

2350-011-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X
ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 11 ORIFICIOS

2350-013-PLACA PARA RADIO DISTAL HI EXTRA LARGA 2.7 / 3.5 MM X
ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 13 ORIFICIOS

2372-003-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 3
ORIFICIOS

2372-005-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 5
ORIFICIOS

2372-007-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 7
ORIFICIOS

2372-009-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 9
ORIFICIOS

2372-011-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 11
ORIFICIOS

2372-013-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 13
ORIFICIOS

2388-003-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 3 ORIFICIOS

2388-004-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 4 ORIFICIOS

2388-005-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2388-006-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 6 ORIFICIOS

2388-007-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS

2388-008-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 8 ORIFICIOS

2388-009-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS

2388-010-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 10 ORIFICIOS





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 2388-011-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 11 ORIFICIOS
- 2388-012-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 12 ORIFICIOS
- 2388-013-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 13 ORIFICIOS
- 2388-014-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 14 ORIFICIOS
- 2388-015-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 15 ORIFICIOS
- 2388-016-PLACA RECTA DCP RC2 BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 16 ORIFICIOS
- 2389-003-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO
X 3 ORIFICIOS
- 2389-004-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO
X 4 ORIFICIOS
- 2389-005-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO
X 5 ORIFICIOS
- 2389-006-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO
X 6 ORIFICIOS
- 2389-007-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO
X 7 ORIFICIOS
- 2389-008-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO
X 8 ORIFICIOS
- 2389-009-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO
X 9 ORIFICIOS
- 2389-010-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO
X 10 ORIFICIOS

✓

2389-012-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO
X 12 ORIFICIOS

2389-014-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO
X 14 ORIFICIOS

2389-016-PLACA 1/3 DE TUBO DUO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS TITANIO
X 16 ORIFICIOS

2393-003-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 3 ORIFICIOS

2393-004-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 4 ORIFICIOS

2393-005-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2393-006-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 6 ORIFICIOS

2393-007-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS

2393-008-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 8 ORIFICIOS

2393-009-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS

2393-010-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 10 ORIFICIOS

2393-012-PLACA 1/3 DE TUBO RC2 3,5MM TITANIO X 12 ORIFICIOS

2715-003-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 3 ORIFICIOS

2715-004-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 4 ORIFICIOS

2715-005-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2715-006-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 6 ORIFICIOS

2715-007-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS

2715-008-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 8 ORIFICIOS

2715-009-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS

2715-010-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 10 ORIFICIOS

2715-012-PLACA RECTA DCP RC2 3,5MM TITANIO X 12 ORIFICIOS

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2716-005-PLACA PARA OLÉCRANON OCL BLOQUEADA 3.5 MM DERECHA
TITANIO X 5 ORIFICIOS

2716-007-PLACA PARA OLÉCRANON OCL BLOQUEADA 3.5 MM DERECHA
TITANIO X 7 ORIFICIOS

2716-009-PLACA PARA OLÉCRANON OCL BLOQUEADA 3.5 MM DERECHA
TITANIO X 9 ORIFICIO

2726-005-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 5 ORIFICIOS

2726-006-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 6 ORIFICIOS

2726-007-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 7 ORIFICIOS

2726-008-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 8 ORIFICIOS

2726-009-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 9 ORIFICIOS

2726-010-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 10 ORIFICIOS

2726-011-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 11 ORIFICIOS

2726-012-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 12 ORIFICIOS

2726-013-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 13 ORIFICIOS

2726-014-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 14 ORIFICIOS

2726-015-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 15 ORIFICIOS

2726-016-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 16 ORIFICIOS

2726-018-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 18 ORIFICIOS

2726-020-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 20 ORIFICIOS

2726-022-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3,5MM TITANIO X 22 ORIFICIOS

✓

2727-004-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 4
ORIFICIOS

2727-005-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 5
ORIFICIOS

2727-006-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 6
ORIFICIOS

2727-007-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 7
ORIFICIOS

2727-008-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 8
ORIFICIOS

2727-009-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 9
ORIFICIOS

2727-010-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
10 ORIFICIOS

2727-011-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
11 ORIFICIOS

2727-012-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
12 ORIFICIOS

2727-013-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
13 ORIFICIOS

2727-014-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
14 ORIFICIOS

2727-015-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
15 ORIFICIOS



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2727-016-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
16 ORIFICIOS

2727-018-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
18 ORIFICIOS

2727-020-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
20 ORIFICIOS

2727-022-PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
22 ORIFICIOS

2728-005-PLACA PARA OLECRANON DERECHA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 5
ORIFICIOS

2728-007-PLACA PARA OLECRANON DERECHA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 7
ORIFICIOS

2728-009-PLACA PARA OLECRANON DERECHA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 9
ORIFICIOS

2729-005-PLACA PARA HÚMERO DISTAL LATERAL POSTERIOR BLOQUEADA 3.5
mm X 5 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2729-007-PLACA PARA HÚMERO DISTAL LATERAL POSTERIOR BLOQUEADA 3.5
mm X 7 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2729-009-PLACA PARA HÚMERO DISTAL LATERAL POSTERIOR BLOQUEADA 3.5
mm X 9 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2729-011-PLACA PARA HÚMERO DISTAL LATERAL POSTERIOR BLOQUEADA 3.5
mm X 11 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2729-013-PLACA PARA HÚMERO DISTAL LATERAL POSTERIOR BLOQUEADA 3.5
mm X 13 ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2730-005-PLACA PARA HÚMERO DISTAL LATERAL IZQ POSTERIOR BLOQ 3,5MM
TITANIO X 5 ORIFICIOS

2730-007-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ POSTERIOR BLOQ 3,5MM
TITANIO X 7 ORIFICIOS

2730-009-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ POSTERIOR BLOQ 3,5MM
TITANIO X 9 ORIFICIOS

2730-011-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ POSTERIOR BLOQ 3,5MM
TITANIO X 11 ORIFICIOS

2730-013-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ POSTERIOR BLOQ 3,5MM
TITANIO X 13 ORIFICIOS

2730-017-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ POSTERIOR BLOQ 3,5MM
TITANIO X 17 ORIFICIOS

2735-003-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 3
ORIFICIOS

2735-005-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 5
ORIFICIOS

2735-007-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 7
ORIFICIOS

2735-009-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X 9
ORIFICIOS

2735-011-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
11 ORIFICIOS

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2735-013-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
13 ORIFICIOS

2735-015-PLACA PARA HUMERO PROXIMAL AZ BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
15 ORIFICIOS

2737-004-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM
2+ TITANIO X 4 ORIFICIOS

2737-005-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM
2+ TITANIO X 5 ORIFICIOS

2738-004-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM
3+ TITANIO X 4 ORIFICIOS

2738-005-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM
3+ TITANIO X 5 ORIFICIOS

2738-006-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM
3+ TITANIO X 6 ORIFICIOS

2738-007-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM
3+ TITANIO X 7 ORIFICIOS

2738-009-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM
3+ TITANIO X 9 ORIFICIOS

2738-012-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM
3+ TITANIO X 12 ORIFICIOS

2738-013-PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA 3,5MM
3+ TITANIO X 13 ORIFICIOS

✓

2743-009-PLACA PARA RADIO DISTAL VP ANATOMICA BLOQUEADA 2.7/3.5MM
DERECHA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2743-010-PLACA PARA RADIO DISTAL VP ANATOMICA BLOQUEADA 2.7/3.5MM
DERECHA TITANIO X 10 ORIFICIOS

2744-008-PLACA PARA RADIO DISTAL VP ANATOMICA BLOQUEADA 2.7/3.5MM
IZQUIERDA TITANIO X 8 ORIFICIOS

2744-009-PLACA PARA RADIO DISTAL VP ANATOMICA BLOQUEADA 2.7/3.5MM
IZQUIERDA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2744-010-PLACA PARA RADIO DISTAL VP ANATOMICA BLOQUEADA 2.7/3.5MM
IZQUIERDA TITANIO X 10 ORIFICIOS

2773-003-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA 2,7/3,5MM TITANIO X 3
ORIFICIOS

2773-004-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA 2,7/3,5MM TITANIO X 4
ORIFICIOS

2773-005-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA 2,7/3,5MM TITANIO X 5
ORIFICIOS

2773-006-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA 2,7/3,5MM TITANIO X 6
ORIFICIOS

2775-003-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA BLOQUEADA 2,7/3,5MM
TITANIO X 3 ORIFICIOS

2775-004-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA BLOQUEADA 2,7/3,5MM
TITANIO X 4 ORIFICIOS

2775-005-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA BLOQUEADA 2,7/3,5MM
TITANIO X 5 ORIFICIOS

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2775-006-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA BLOQUEADA 2,7/3,5MM
TITANIO X 6 ORIFICIOS

2775-008-PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA BLOQUEADA 2,7/3,5MM
TITANIO X 8 ORIFICIOS

2782-005-PLACA PARA OLECRANON IZQUIERDA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
5 ORIFICIOS

2782-007-PLACA PARA OLECRANON IZQUIERDA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
7 ORIFICIOS

2782-009-PLACA PARA OLECRANON IZQUIERDA BLOQUEADA 3,5MM TITANIO X
9 ORIFICIOS

2783-009-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL AZ EXTRA LARGA BLOQUEADA 3.5
MM X ORIFICIOS TITANIO X 9 ORIFICIOS

2783-011-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL AZ EXTRA LARGA BLOQUEADA 3.5
MM X ORIFICIOS TITANIO X 11 ORIFICIOS

2783-013-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL AZ EXTRA LARGA BLOQUEADA 3.5
MM X ORIFICIOS TITANIO X 13 ORIFICIOS

2783-015-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL AZ EXTRA LARGA BLOQUEADA 3.5
MM X ORIFICIOS TITANIO X 15 ORIFICIOS

2788-006-PLACA PARA CÚBITO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS
TITANIO X 6 ORIFICIOS

2788-008-PLACA PARA CÚBITO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS
TITANIO X 8 ORIFICIOS

1

2788-010-PLACA PARA CÚBITO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS
TITANIO X 10 ORIFICIOS

2788-012-PLACA PARA CÚBITO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS
TITANIO X 12 ORIFICIOS

2789-006-PLACA DORSOLATERAL PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM
X ORIFICIOS TITANIO X 6 ORIFICIOS

2789-008-PLACA DORSOLATERAL PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM
X ORIFICIOS TITANIO X 8 ORIFICIOS

2789-010-PLACA DORSOLATERAL PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM
X ORIFICIOS TITANIO X 10 ORIFICIOS

2789-012-PLACA DORSOLATERAL PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM
X ORIFICIOS TITANIO X 12 ORIFICIOS

2790-006-PLACA VOLAR PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X
ORIFICIOS TITANIO X 6 ORIFICIOS

2790-008-PLACA VOLAR PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X
ORIFICIOS TITANIO X 8 ORIFICIOS

2790-010-PLACA VOLAR PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X
ORIFICIOS TITANIO X 10 ORIFICIOS

2790-012-PLACA VOLAR PARA RADIO DIAFISARIO BLOQUEADA 3.5 MM X
ORIFICIOS TITANIO X 12 ORIFICIOS

2791-000-PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR CL3 BLOQUEADA CORTA 3,5MM
TITANIO

2792-005-PLACA PARA OLÉCRANON OCL BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS
IZQUIERDA TITANIO X 5 ORIFICIOS

7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2792-007-PLACA PARA OLÉCRANON OCL BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS
IZQUIERDA TITANIO X 7 ORIFICIOS

2792-009-PLACA PARA OLÉCRANON OCL BLOQUEADA 3.5 MM X ORIFICIOS
IZQUIERDA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2818-000-PLACA PARA CUBITO RECTA BLOQUEADA 2.7MM TITANIO

2819-000-PLACA PARA CUBITO EN T BLOQUEADA 2.7MM TITANIO

2820-000-PLACA PARA CUBITO EN L BLOQUEADA 2.7MM IZQUIERDA TITANIO

2821-000-PLACA PARA CÚBITO EN L OBLICUA BLOQUEADA 2.7 MM DERECHA
TITANIO

2835-003-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL PURPLE BLOQUEADA 3.5 mm X 3
ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2835-005-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL PURPLE BLOQUEADA 3.5 mm X 5
ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2836-003-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL PURPLE BLOQUEADA 3.5 mm X 3
ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2836-005-PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL PURPLE BLOQUEADA 3.5 mm X 3
ORIFICIOS DERECHA TITANIO

2837-000-PLACA PARA ACORTAMIENTO DE CÚBITO ULNIQUE BLOQUEADA
TITANIO

2900-000-PLACA PARA CLAVICULA DISTAL CL3 DERECHA BLOQUEADA LARGA
2,7/3,5MM TITANIO

1

2901-000-PLACA PARA CLAVICULA DISTAL CL3 IZQUIERDA BLOQUEADA LARGA
2,7/3,5MM TITANIO

2902-000-PLACA PARA CLAVICULA MEDIAL CL3 DERECHA BLOQUEADA CORTA
3,5MM TITANIO

2903-000-PLACA PARA CLAVICULA MEDIAL CL3 IZQUIERDA BLOQUEADA CORTA
3,5MM TITANIO

2904-000-PLACA PARA CLAVICULA MEDIAL CL3 DERECHA BLOQUEADA LARGA
3,5MM TITANIO

2905-000-PLACA PARA CLAVICULA MEDIAL CL3 IZQUIERDA BLOQUEADA LARGA
3,5MM TITANIO

2906-000-PLACA PARA CLAVICULA TOTAL DERECHA BLOQUEADA 3,5MM
TITANIO

2907-000-PLACA PARA CLAVICULA TOTAL CL3 IZQUIERDA BLOQUEADA 3,5MM
TITANIO

2908-000-PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR CL3 LARGA BLOQUEADA 3,5MM
TITANIO

2909-000-PLACA PARA CLAVICULA DISTAL CL3 DERECHA BLOQUEADA CORTA
2,7/3,5MM TITANIO

2910-000-PLACA PARA CLAVICULA DISTAL CL3 IZQUIERDA BLOQUEADA CORTA
2,7/3,5MM TITANIO

2984-005-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X
ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 5 ORIFICIOS

2984-007-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X
ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 7 ORIFICIOS

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2984-009-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X
ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2984-018-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X
ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 18 ORIFICIOS

2985-005-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X
ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 5 ORIFICIOS

2985-007-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X
ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 7 ORIFICIOS

2985-009-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL BLOQUEADA 3.5 MM X
ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 9 ORIFICIOS

2986-000-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL MEDIAL BLOQUEADA 3.5 MM 2 + 5
ORIFICIOS TITANIO

2987-005-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA
3.5 MM 3+ X ORIFICIOS TITANIO X 5 ORIFICIOS

2987-007-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA
3.5 MM 3+ X ORIFICIOS TITANIO X 7 ORIFICIOS

2987-009-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA
3.5 MM 3+ X ORIFICIOS TITANIO X 9 ORIFICIOS

2987-018-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL LATERAL ANTERIOR BLOQUEADA
3.5 MM 3+ X ORIFICIOS TITANIO X 18 ORIFICIOS

2988-005-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL DORSO LATERAL BLOQUEADA 3.5
MM DERECHA X ORIFICIOS TITANIO X 5 ORIFICIOS

✓

2988-007-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL DORSO LATERAL BLOQUEADA 3.5
MM DERECHA X ORIFICIOS TITANIO X 7 ORIFICIOS

2989-005-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL DORSO LATERAL BLOQUEADA 3.5
MM IZQUIERDA X ORIFICIOS TITANIO X 5 ORIFICIOS

2989-007-PLACA PARA HÚMERO DISTAL OCL DORSO LATERAL BLOQUEADA 3.5
MM IZQUIERDA X ORIFICIOS TITANIO X 7 ORIFICIOS

2996-003-PLACA TRACER BLOQUEADA 3.5 / 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO
IZQUIERDA X 3 ORIFICIOS

2996-004-PLACA TRACER BLOQUEADA 3.5 / 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO
IZQUIERDA X 4 ORIFICIOS

2996-005-PLACA TRACER BLOQUEADA 3.5 / 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO
IZQUIERDA X 5 ORIFICIOS

2997-003-PLACA TRACER BLOQUEADA 3.5 / 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO
DERECHA X 3 ORIFICIOS

2997-004-PLACA TRACER BLOQUEADA 3.5 / 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO
DERECHA X 4 ORIFICIOS

2997-005-PLACA TRACER BLOQUEADA 3.5 / 2.7 MM X ORIFICIOS TITANIO
DERECHA X 5 ORIFICIOS

3218-003-PLACA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC 2.4 / 3.5 MM X
ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 3 ORIFICIOS

3218-004-PLACA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC 2.4 / 3.5 MM X
ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 4 ORIFICIOS

3218-005-PLACA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC 2.4 / 3.5 MM X
ORIFICIOS DERECHA TITANIO X 5 ORIFICIOS

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3219-003-PLACA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC 2.4 / 3.5 MM X
ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 3 ORIFICIOS

3219-004-PLACA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC 2.4 / 3.5 MM X
ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 4 ORIFICIOS

3219-005-PLACA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC 2.4 / 3.5 MM X
ORIFICIOS IZQUIERDA TITANIO X 5 ORIFICIOS
INSTRUMENTAL ASOCIADO

Período de vida útil: no corresponde.

Forma de presentación: envasados individualmente.

Método de esterilización: NO ESTÉRIL.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A.

Lugar/es de elaboración: Perito Moreno 845, UF 1 a 3 y de 22 a 28, Parque
Industrial Canning, Ezeiza, Provincia de Bs. As.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM- 2022-
47, con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición
autorizante.

Expediente Nº 1-47-3110-7759-17-2

Disposición Nº **2886**

22 MAR 2018

Dr. ROBERTO LEBE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.