



“2010 -Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

## DISPOSICIÓN N° 7119

BUENOS AIRES, 12 NOV 2010

VISTO el Expediente N° 1-47-21466-09-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

### CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Medtronic Latin América Inc., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

## DISPOSICIÓN N° 7 1 1 9

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA  
DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Medtronic, nombre descriptivo Catéteres angiográficos cardiovasculares, nombre técnico catéteres para angiografía, de acuerdo a lo solicitado, por Medtronic Latin América Inc., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 155 a 182 y 184 a 192 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM 1842-55, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscribese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

“2010 -Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

**DISPOSICIÓN N° 7 1 1 9**

Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido,  
archívese.

Expediente N° 1-47-21466-09-7

DISPOSICIÓN N° **7 1 1 9**

**Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.**



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° **7119**.....

Nombre descriptivo: Catéteres angiográficos cardiovasculares

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 10-688 - Catéteres, para Angiografía

Marca de (los) producto(s) médico(s): MEDTRONIC

Clase de Riesgo: Clase IV

Indicación/es autorizada/s: registrar presiones intracardíacas, tomar muestras de sangre e introducir sustancias en el corazón y en los vasos.

Modelo/s: SiteSeer y Pro-Flo.

SITSEER 4F:

SITSEER JR 3.5, 4.0, 5.0 y 6.0 100 cm y JR 4.0 125 cm

SITSEER MOD JR 4.0 100 cm

SITSEER NTR 100 cm

SITSEER 3D RC 100 cm

SITSEER CP 0,5, 1.0 y 3.0 SITSEER 100 cm

SITSEER JL 3.5I, 4.0I, 4.5I, 5.0I y 6.0I 100 cm y JL 4.0 125 cm

SITSEER CHP 3.5 SITSEER 100 cm

SITSEER AR I y II 100 cm

SITSEER AL I, II y III 100 cm

SITSEER MP A-1, A-2, B-1, B-2 100 cm y 110 cm

SITSEER STR TR PIGTAIL 125 cm

SITSEER 145 y 155 DEG PIGTAIL 125 cm

SITSEER TGHT RAD PIG 110 cm

SITSEER TGHT RAD PIG 145DG y 155 DG 110

SITSEER IMA 100 cm

SITSEER LCB 100 cm

SITSEER RCB 100 cm

SITSEER BRACHIAL 3.5, 4.0 y 4.5

SITSEER SONES A, B y C y SONES A, B y C 80 cm

SITSEER ARANI I y II

SITSEER CHAMP 0.5, 1.0, 3.0 y 3.5 110 cm

SITSEER BRACHIAL 3.5, 4.0 y 4.5 80 cm

SITSEER EL GAMAL 1

SITSEER AK W/STRAIGHT PIGTAIL



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

SITeseer AK W/145 y 155 DEGREE PIGTAIL  
SITeseer AR MOD  
SITeseer ANGIO KIT W/3D RIGHT  
SITeseer ANGIOKIT y ANGIOKIT W/155 PIG  
SITeseer CATHETER 04SR008 SS MOD. STR. PTAIL, 04SR009 SS MOD. 145  
PTAIL SI y 04SR011 SS STR. 125 cm

SITeseer 5F:

SITeseer JR 3.5, 4.0, 4.0I, 5.0 y 6.0 100 cm y JR 4.0I SS 125 cm  
SITeseer MOD JR 4.0 100 cm  
SITeseer NTR 100 cm  
SITeseer 3D RC 100 cm  
SITeseer CHP 0.5, 1.0, 3.0 y 3.5 SITeseer 100 cm  
SITeseer JL 3.5, 3.5I, 4.0, 4.0I, 4.5, 4.5I, 5.0, 5.0I y 6.0I 100 cm y JL 4.0, 4.0I  
125 cm  
SITeseer AR I y II 100 cm  
SITeseer AL I, II y III 100 cm  
SITeseer MP A-1, A-2, B-1, B-2 100 cm y 110 cm  
SITeseer STR TGHT RAD PIG 110 cm  
SITeseer TGHT RAD PIG 145DG y 155 DG 110  
SITeseer IMA 100 cm  
SITeseer LCB 100 cm  
SITeseer RCB 100 cm  
SITeseer BRACHIAL 3.5, 4.0 y 4.5 100 cm  
SITeseer SONES A, B y C 100 cm y SONES A, B y C 80 cm  
SITeseer ARANI I y II SS 100 cm  
SITeseer CHAMP 0.5 SS, 1.0, 3.0 y 3.5 110 cm  
SITeseer BRACHIAL 3.5, 4.0 y 4.5 80 cm  
SITeseer EL GMAL SITeseer 100 cm  
SITeseer AK W/STR PG, W/145 ANG y W/155 PIGTAIL  
SITeseer EZPAK W/INP STR PGT, W/145 PGT INP y W/155 PGTL INP  
SITeseer AR MOD SITeseer 100 cm  
SITeseer STRD STR PIG 110 cm y 125 cm  
SITeseer STRD 145DEG PIG y 155 DEG PIG 110 cm  
SITeseer AK W/3DRC 145  
SITeseer EZPK W/STR PG 3DRC INP, W/ST y 145 PIG 0.038 INP  
SITeseer ANGIOKIT  
SITeseer BTO SITeseer CHOICEPAK  
SITeseer BTO EZ PAK  
SITeseer BTO CHOICEPAK  
SITeseer BTO ANGIOKIT  
SITeseer EZPAK  
SITeseer BTO EZPAK W/145 P, W/3DRC y W/O PIG  
SITeseer CATHETER SS CASTILO 1.5 100 cm  
SITeseer CATHETER SS MEENGs 100 cm

5

7119



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

SITSEER CATHETER SS BLANC CURVE 100 cm  
SITSEER CATHETER SS JL 5.0, 6.0 y 7.0 125 cm  
SITSEER CATHETER SS JR 5.0 y 6.0 125 cm  
SITSEER CATHETER SS AL 3.0 125 cm  
SITSEER CATHETER SS AL II 125 cm SPL  
SITSEER CATHETER SS MB2 125 cm SPL SIT  
SITSEER CATHETER SS STR PTAIL 110 cm  
SITSEER CATHETER SS MODIFIED JL 4.0 10  
SITSEER CATHETER SS ALCEBO, T RAD  
SITSEER CATHETER SS MOD MP 100 cm SP  
SITSEER CATHETER SS SIMMONS II 100 cm  
SITSEER CATHETER SS MAC 3.0 100 cm SI  
SITSEER CATHETER SS AL 1.0 125 cm SIT  
SITSEER CATHETER SS 145 cm PIGTAIL OSH  
SITSEER CATHETER SS CATH. DIAG. VDL-1, VDL-2 y VDL-3  
SITSEER CATHETER SS CATH. DIAG. VDR-1, VDR-2 y VDR-3  
SITSEER CATHETER SS MP A-2 125 cm SI  
SITSEER CATHETER SS CATH. DIAG. SFSPL  
SITSEER CATHETER SS STR PTAIL W/12 SH  
SITSEER CATHETER SS MP B-1 80 cm

SITSEER 6F:

SITSEER JR 3.5, 4.0, 4.0I, 4CC, 5.0 y 6.0 100 cm y JR 4.0, 4.0I 125 cm  
SITSEER MOD JR 4.0 100 cm  
SITSEER NTR 100 cm  
SITSEER 3D RC 100 cm  
SITSEER CP 0,5, 1.0, 3.0 y 3.5 cm SITSEER 100 cm  
SITSEER JL 3.5, 3.5I, 4.0, 4.0I, 4.5, 4.5I, 5.0, 5.0I y 6.0I 100 cm y JL 4.0, 4.0I 125 cm  
SITSEER AR MOD, I y II 100 cm  
SITSEER AL I, II y III 100 cm  
SITSEER MP A-1, A-2, B-1, B-2 100 cm  
SITSEER STR XT PIG 125 cm 6SH y PIGTL 110 cm 12SH  
SITSEER 145DG PIGTL 110 cm 12SH y 6SH y 155DG PIGTL 110 cm  
SITSEER STR PIGTL 110 cm 6SH  
SITSEER IMA 110 cm  
SITSEER LCB 100 cm  
SITSEER RCB 100 cm  
SITSEER BRACHIAL 3.5, 4.0 y 4.5 100 cm y 80 cm  
SITSEER SONES A, B y C 100 cm y SONES A, B y C 80 cm  
SITSEER ARANI I y II 100 cm  
SITSEER CHAMP 0.5, 1.0, 3.0 y 3.5 110 cm  
SITSEER MP A-1, A-2, B-1, B-2 110 cm  
SITSEER EL GAMAL SITSEER 100 cm  
SITSEER ANGIOKIT W/STRPGTL, W/145 PGTL y W/155 PGTL



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas,*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

SITSEER EZPAK W/STR PG 0.035INP, W/145 y 155 PG 0.035INP  
SITSEER XT STRD STR PIGTL 110 cm  
SITSEER XT 145DEG y 155DEG PIGTL 110 cm  
SITSEER ANGIOKIT W/3DRC & XT, W/STR XT6SH, W/145 XT 6SH  
SITSEER EZPK W/3DRC XT 0.035INP, W/0.038 INP STRPG y 145 PIG 0.038  
INP  
SITSEER XT STR y 145DE PIGTL 6SH 110 cm  
SITSEER STR PGTL 110 cm y 125 cm 6 SH  
SITSEER XT TR y TR145 PIG 6SH 110 cm  
SITSEER EZPAK W/STR XT6SH 0.035 y 0.038  
SITSEER EZPAK W/145 6SH 0.035INP y 0.038INP, W/3DRC 0.035INP, 0.035INP  
SITSEER ANGIOKIT W/3DRC y 145  
SITSEER BTO ANGIOKIT, W/145  
SITSEER BTO EZ PAK  
SITSEER BTO EZPAK, W/145 P, W/3DRC  
SITSEER ANGIOKIT  
SITSEER BTO CHOICEPAK  
SITSEER BTO SITSEER EZ PAK  
SITSEER BTO EZ PAK  
SITSEER CATHETER SS JL3.0 100 cm  
SITSEER CATHETER SS JR 3.0 100 cm  
SITSEER CATHETER SSCOLLINS 70 mm TIP 1  
SITSEER CATHETER SSGENSINI 125 cm SP  
SITSEER CATHETER SSEBU 4.0 100 cm SPL  
SITSEER CATHETER SS  
SITSEER CATHETER SS AL II 125 cm 70SPL  
SITSEER CATHETER SS JR 5.0 125 cm SPL  
SITSEER CATHETER SS MP A-2 125 cm SPL  
SITSEER CATHETER SS AL IV 100 cm SPL  
SITSEER CATHETER SS JL 5.0 125 cm SPL  
SITSEER CATHETER SS AL III 125 cm SPL  
SITSEER CATHETER SS MAC 3.5 100 cm  
SITSEER CATHETER SS CHAMP 2.0 100 cm  
SITSEER CATHETER SS EBU 3.5 100 cm SPL  
SITSEER CATHETER SS JL 3.0 100 cm SPL  
SITSEER CATHETER SS BRACHIAL 3.5 OSH 1  
SITSEER CATHETER SS BRACHIAL 4.0 OSH 1  
SITSEER CATHETER SS MAC 4.0 y 4.5 100 cm S  
SITSEER CATHETER SS SIMMONS III SITE

PRO-FLO 6F:

PRO-FLO BTO CHOICEPAK  
PRO-FLO SFT TIP BTO CHOICEPAK  
PRO-FLO ST BTO CHOICEPAK  
PRO-FLO ST XT CHOICEPAK



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas,*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

PRO-FLO BTO CHOICEPACK INPUT  
PRO-FLO ST A-K W/HEMA II  
PRO-FLO PF ST CHOICEPAK  
PRO-FLO CHOICEPAK  
PRO-FLO BTO CHOICE 3 CATH INPUT S  
PRO-FLO TO CHOICE W/INPUT  
PRO-FLO BTO CHOICEPACK 3 CATH INPUT  
PRO-FLO BTO CHOICEPACK INPUT SHEAT  
PRO-FLO BTO CHOICEPACK INPUT  
PRO-FLO BTO-FLO XT CHOICEPACK  
PRO-FLO ST XT EZ-PAK  
PRO-FLO BTO EZ W/0.035 y 0.038 WIRE  
PRO-FLO EZ-PAK  
PRO-FLO ST EZ-PAK  
PRO-FLO ST A-K 7F EXL  
PRO-FLO 6F PF EZ-PAK  
PRO-FLO BTO EZ PAK  
PRO-FLO BTO KIT  
PRO-FLO ANGIO KIT  
PRO-FLO ST ANGIO KIT  
PRO-FLO SOFT TIP W/NTR  
PRO-FLO XT ANGIO KIT  
PRO-FLO ANGIO KIT BTO  
PRO-FLO ST XT A-K  
PRO-FLO ST A-K  
PRO-FLO ST XT ANGIO KIT  
PRO-FLO ST ANGIOKIT  
PRO-FLO ANGIOKIT W/145 DEG. PIGT  
PRO-FLO ST CHOICEPAK  
PRO-FLO EZ W/0.035 WIRE/IN S  
PRO-FLO BTO KIT JR 3.5 PIG 145 WI  
PRO-FLO ST MULTI A-2 2SH 5M  
PRO-FLO JL 3.5, 4.5 y 6 ST 100 cm  
PRO-FLO ST JR 4 125 cm  
PRO-FLO ST JL 4.5 100 cm  
PRO-FLO ST MULTI A-2 y A-1 12S cm  
PRO-FLO SOFT TIP JR 3.5, 4 y 5  
PRO-FLO JR 6 ST 100 cm  
PRO-FLO ST JR 4M  
PRO-FLO SOFT TIP M A RIGHT  
PRO-FLO SOFT TIP TORQUE RIGHT  
PRO-FLO SOFT TIP JL 3.5, 4 y 5  
PRO-FLO SOFT TIP AR-1 y II  
PRO-FLO SOFT TIP AL 1 y II  
PRO-FLO SOFT TIP IMA





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas,*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

PRO-FLO XT 145 PGTL 6SH  
PRO-FLO 110 PIGTAIL XT  
PRO-FLO 110 145 PIGTAIL XT  
PRO-FLO XT 155 ANG  
PRO-FLO 145DG ANGLE TR PG  
PRO-FLO XT145 ANGLE TR P  
PRO-FLO XT PIGTAIL ST 125 cm  
PRO-FLO PFXT PGTL 614D 125C  
PRO-FLO STR PGTL 110cm 12SH y 6SH  
PRO-FLO 145DG PGTL 110cm 2SH y 6SH  
PRO-FLO 155DG PGTL 110cm  
PRO-FLO EZPAK 0.035 INP  
PRO-FLO STR PGTL 125cm 6SH  
PRO-FLO XT STRD PGTL 110  
PRO-FLO 145DEG y 155 DE PGTL 110cm  
PRO-FLO XT STR PIGTL 6SH 110cm y 125 cm  
PRO-FLO XT 145DE PIG 6SH 110cm  
PRO-FLO XT TR PIG 6SH 110cm  
PRO-FLO XT TR145 PIG 6SH 110cm  
PRO-FLO AL II 100 cm 6SH  
PRO-FLO AL II 120 cm SPL  
PRO-FLO AL IV 100 cm  
PRO-FLO AR I 120 cm SPL  
PRO-FLO AR III 100 cm  
PRO-FLO CASTILLO I 100 cm SPL  
PRO-FLO CASTILLO II 100 cm  
PRO-FLO JL 4.0 120 cm  
PRO-FLO PL JL 4.0 125 cm SPLC  
PRO-FLO SPECIAL  
PRO-FLO JR 4.0 120 cm  
PRO-FLO PGTL 145 DEG 120 cm  
PRO-FLO 145DEG PGTL 6SH 125cm  
PRO-FLO 125 cm PGTL SPECIAL  
PRO-FLO MULTI 5 mm HIGHER SP  
PRO-FLO JL 6.0 125 cm SPL  
PRO-FLO JR 4, 5 y 6 125 cm  
PRO-FLO IMA SPECIAL  
PRO-FLO MULTI A-1 125 cm SPL  
PRO-FLO AL III 100 cm SPL  
PRO-FLO BERENSTEIN 110 cm SP  
PRO-FLO JR 6.0 100 cm SPL  
PRO-FLO MP A-2 120 cm SPECIAL  
PRO-FLO TGT RAD PIGTAIL 125 cm  
PRO-FLO JL6 4SH 100 cm  
PRO-FLO TIGHT RADIUS U CURVE PIG



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

PRO-FLO AL III 125 cm SPL  
PRO-FLO SOFT TIP SPL  
PRO-FLO SOFT TIP ALIV 100 cm SPL  
PRO-FLO SOFT TIP SPECIAL  
PRO-FLO ST ARI 125 cm  
PRO-FLO ST CHAMP 3.0 100 cm  
PRO-FLO 6 FRENCHSOFT TIP  
PRO-FLO ST JL 5 125 cm SPL  
PRO-FLO ST JR 6.0 120 cm  
PRO-FLO JR 6.0 125 cm SP  
PRO-FLO ST MULTI B1 y B2 125 cm  
PRO-FLO ST 100 cm SHORT BYPA  
PRO-FLO ST WILLIAMS L/R 100  
PRO-FLO ST JL 5.0 115 cm SPL  
PRO-FLO P/F EL GAMAL SPL  
PRO-FLO ST MODIFIED JL 5.0 SPL  
PRO-FLO ST EL GAMAL 4.5 SPL  
PRO-FLO ST JL 4.0 W/SPL 2SH  
PRO-FLO ST PURZYCKI CURVE  
PRO-FLO ST JL 5.0 120 cm SPL  
PRO-FLO ST LIMA 100 cm SPL  
PRO-FLO ST JR 4.0 15 DEG 30 mm  
PRO-FLO ST JL 3.0 100 cm  
PRO-FLO ST JR 3.0 100 cm  
PRO-FLO ST AL 1.5 100 cm  
PRO-FLO ST HOCKEY STICK 100 cm  
PRO-FLO ST AR II 125 cm SPL  
PRO-FLO JR 4.0 W/4 cm BEN  
PRO-FLO ST MODIFIED JL 6.0  
PRO-FLO ST JL 7.0 100 cm SPL  
PRO-FLO ST BERENSTEIN  
PRO-FLO XT VAN TASSEL PIGT  
PRO-FLO XT SPECIAL  
PRO-FLO XT STRAIGHT PIG 110  
PRO-FLO XT MPA2 W/7mm SPL  
PRO-FLO 145DEG PGTL 125cm  
PRO-FLO XT MPA2 100  
PRO-FLO XT BERENSTEIN 110 cm  
PRO-FLO XT JR 4.0 125 cm SPL  
PRO-FLO AL 1.0 125 cm SPL PL  
PRO-FLO XT AL IV 100 cm SPL  
PRO-FLO XT JL 3.0 100 cm SPL  
PRO-FLO XT JR 3.0, 4.5 100 cm SPL  
PRO-FLO XT AR III 120 cm SPL  
PRO-FLO ST XT AL II 125 cm SPL



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas,*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

PRO-FLO SOFT TIP BYP LEFT  
PRO-FLO SOFT TIP RIGHT BYPASS  
PRO-FLO SOFT TIP MULTI A-1  
PRO-FLO W/ST MP B-1 y B-2  
PRO-FLO XT JL 6 ST 100 cm  
PRO-FLO XT JR 6 ST 100 cm  
PRO-FLO 100 JR-4 XT ST  
PRO-FLO 100 JR-3.5 y 5 ST XT  
PRO-FLO ST JR 4M  
PRO-FLO ST XT MULTI  
PRO-FLO 100 MD AMP RT ST XT PF  
PRO-FLO ST XT NO TORQUE R  
PRO-FLO XT W/ST MP B-1  
PRO-FLO XT ACTIVE  
PRO-FLO XT ARANI SFTP  
PRO-FLO 100 JL 3.5, 4, 5 ST XT  
PRO-FLO 100 AR I y II ST XT  
PRO-FLO 100 AL I y II ST XT  
PRO-FLO 100 L BYP ST XT  
PRO-FLO 100 R BYP ST XT  
PRO-FLO 100 IMA ST XT  
PRO-FLO 100 MP A1 y A2 ST XT  
PRO-FLO ST XT JL 4.5 100 cm  
PRO-FLO ST XT AL III 100 cm  
PRO-FLO XT ST JL 4 125 cm  
PRO-FLO TIGHT RAD 9 SH  
PRO-FLO 145D y 155D 9 SH  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY JR 3.5, 4, 5  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY JL 4 y 5  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY AR I y AR II  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY AL I y AL II  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY L BYPASS  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY R BYPASS  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY MULTI A1 y A2  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY IMA TYPE  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY  
PRO-FLO PGTL 6 SIDE HL  
PRO-FLO 145 PGTL 6 SIDE HL  
PRO-FLO 145 ANG PIGTAIL  
PRO-FLO 100 cm 155DEG ANG PIGTAIL  
PRO-FLO TGT RAD PIGTAIL  
PRO-FLO MULTI A-2 W/2.5 cm y 3 cm TIP  
PRO-FLO AL III 100 cm  
PRO-FLO 110 MULTI A-2 XT  
PRO-FLO XT PGTL 6 SDHL



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

PRO-FLO ST XT AR I 125 cm  
PRO-FLO SOFT TIP XT SPECIAL  
PRO-FLO ST XT FL 3.5 cm SPL  
PRO-FLO ST XT MPA2 125 cm  
PRO-FLO ST XT CHAMP 2.0 100 cm  
PRO-FLO ST XT JR 4.0 50 cm  
PRO-FLO ST XT MPA2 50 cm SP

PRO-FLO 7F:  
PRO-FLO ST CHOICEPAK  
PRO-FLO BTO CHOICEPAK  
PRO-FLO CHOICEPAK  
PRO-FLO ST XT CHOICEPAK  
PRO-FLO EZ-PAK  
PRO-FLO ST EZ-PAK  
PRO-FLO SOFT TIP EZ-PAK  
PRO-FLO ST XT EZ-PAK  
PRO-FLO PS ST XT EZ-PAK  
PRO-FLO XT EZ-PAK  
PRO-FLO BTO EZ PAK  
PRO-FLO EZ-PAK 0.035 WIRE/INPUT  
PRO-FLO ANGIO KIT  
PRO-FLO ST ANGIO KIT  
PRO-FLO XT ANGIO KIT  
PRO-FLO SOFT TIP W/NTR  
PRO-FLO STFL XT ANGIO W/NTR  
PRO-FLO BTO ANGIOKIT  
PRO-FLO ST XT ANGIO KIT  
PRO-FLO ST MULTI A-2 110 cm y 125 cm  
PRO-FLO JR 3.5 y 4 SOFT TIP  
PRO-FLO SOFT TIP JR 5  
PRO-FLO ST JL 6, 4.5 100 cm  
PRO-FLO JL 3.5, 4.0 y 5 SOFT TIP  
PRO-FLO ARI y II SOFT TIP  
PRO-FLO ALII SOFT TIP  
PRO-FLO L BYPASS TIP  
PRO-FLO RT BYPASS SOFT  
PRO-FLO SOFT TIP IMA  
PRO-FLO MULTI A1 Y A2 SOFT TIP 100 cm  
PRO-FLO SOFT TIP AL1  
PRO-FLO W/ST MP B-1 y B-2  
PRO-FLO SOFT TIP NO TORQUE R  
PRO-FLO MOD AMPLATZ RT ST  
PRO-FLO ST JR 4M



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas,*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

PRO-FLO ST AL III 100 cm  
PRO-FLO JL 4 100 cm W/SOFT TIP  
PRO-FLO XT JR 6 ST 100  
PRO-FLO JR 3.5, 4 y 5 SOFT TIP XT  
PRO-FLO ST XT NO TORQUE R  
PRO-FLO MOD AMPLATZ RT ST XT  
PRO-FLO XT B-1 y B-2 SOFT TIP  
PRO-FLO XT ARANI W/SOFT TIP  
PRO-FLO ST JL 3.5, 4 y 5 XT  
PRO-FLO AR I y II SOFT TIP XT  
PRO-FLO AL I y II SOFT TIP XT  
PRO-FLO L BYPASS ST XT  
PRO-FLO R BYPASS ST XT  
PRO-FLO IMA ST XT  
PRO-FLO MP A-1 ST XT  
PRO-FLO XT ST JR 4 M  
PRO-FLO PF ST XT JL 4.5 100 cm  
PRO-FLO ST XT MP A-2  
PRO-FLO XT JL 6 ST 100  
PRO-FLO ST JR 6 100 cm  
PRO-FLO 100 JL 3.5, 4 y 5  
PRO-FLO 100 JR 3.5, 4 y 5  
PRO-FLO 100 AR I y II  
PRO-FLO 100 AL I y II  
PRO-FLO 100 LEFT BYPASS  
PRO-FLO RIGHT BYPASS  
PRO-FLO 100 IMA  
PRO-FLO 100 MULTI A-1  
PRO-FLO PGTL 6 SDHL  
PRO-FLO 145 PGTL 6 SDH  
PRO-FLO PIGTAIL  
PRO-FLO ANGL PIGTL 145 y 155 DEG  
PRO-FLO MULTI A2 110 cm  
PRO-FLO MP A-2 XT  
PRO-FLO PIGTAIL 6 SDHL  
PRO-FLO XT 145 PGTL 6 SH  
PRO-FLO 110, 125, 145 y 155 PIGTAIL XT  
PRO-FLO TIGHT RAD PIGTAIL  
PRO-FLO XT 145 ANG TIGHT RAD  
PRO-FLO XT SPECIAL  
PRO-FLO JL 4.0 125 cm SPL  
PRO-FLO JL 4.5 100 cm SPL  
PRO-FLO JR 4.0 125 cm SPL  
PRO-FLO SPECIAL  
PRO-FLO 145 PGTL 110 cm NO SI



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

PRO-FLO PIGTAIL 90 cm 12 SH  
PRO-FLO TIGHT RADIUS PIG 11  
PRO-FLO 120 DEG PIGTAIL 110  
PRO-FLO TIGHT RADIUS PIGTAIL SPECIAL  
PRO-FLO BERENSTEIN 110 cm SP  
PRO-FLO BERENSTEIN 65 cm y 50 cm SPL  
PRO-FLO 120 DEG PIGTAIL 8SH  
PRO-FLO BERENSTEIN W/10  
PRO-FLO SOFT TIP SPL  
PRO-FLO ST AL IV 100 cm  
PRO-FLO ST JL 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 y 8.0 125 cm SPL  
PRO-FLO ST JR 4.0, 5.0 y 6.0 125 cm SPL  
PRO-FLO ST MULTI B2 125 cm  
PRO-FLO ST AL III 100 cm  
PRO-FLO ST JR4 4.0 cm BENT TIP  
PRO-FLO ST JR4 2.5 cm BENT TIP  
PRO-FLO ST AL I, II y III 125 cm  
PRO-FLO ST JL 3.5 125 cm  
PRO-FLO SIMMONS II y III 100 cm  
PRO-FLO ST 125 cm SONES A  
PRO-FLO STRAIGHT PIGTAIL  
PRO-FLO XT BERENSTEIN 110 cm  
PRO-FLO ST XT JR 4.0 125 cm  
PRO-FLO ST XT JR 5.0 125 cm SPL  
PRO-FLO XT SONES C 100 cm  
PRO-FLO ST XT NO TORQUE  
PRO-FLO ST XT SPL  
PRO-FLO ST XT AL I 125 P  
PRO-FLO ST XT McCROSSAN 100 cm

Período de vida útil: 36 meses

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante:

- 1) Availmed S.A. de C.V.
- 2) Medtronic Vascular
- 3) Medtronic Inc.

Lugar/es de elaboración:

- 1) Avenida Paseo Reforma N° 8950 Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H) G2, La Mesa, Tijuana, Baja California, México 22116.
- 2) 37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923 US, Estados Unidos.



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

3) 710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, Estados Unidos.

Expediente Nº 1-47-21466-09-7

DISPOSICIÓN Nº **7 1 1 9**

*O. Orsinger*  
**DR. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.**



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas,*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del  
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

.....**7119**.....

  
**DR. OTTO A. ORSINGER**  
**SUB-INTERVENTOR**  
**A.N.M.A.T.**



**ANEXO III B - INSTRUCCIONES DE USO**

*Fabricado por Availmed S.A. de C.V.,*

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H)  
G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

*Importado por MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.*

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700

**SiteSeer® and ProFlo® Cardiovascular Angiographic Catheters****Catéteres angiográficos cardiovasculares**

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

PRODUCTO DE UN SOLO USO.

Esterilizado por óxido de etileno.

Proteger del calor y de la humedad. No doblar.

*Lea las Instrucciones de Uso.*

**DESCRIPCIÓN:**

Catéter intravascular para diagnóstico, con o sin estilete formador de punta.



Curva Tipo Judkins, para coronaria derecha



Curva Tipo Judkins 1, para coronaria derecha

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



**MOD JR**



Curva Tipo Judkins modificado, para coronaria derecha

**JL**



Curva Tipo Judkins, para coronaria izquierda

**JL I**



Curva Tipo Judkins 1, para coronaria izquierda

**CMKR JR**




Curva Cardio-Marker, tipo Judkins para coronaria derecha

**CMKR JL**



Curva Cardio-Marker, tipo Judkins para coronaria izquierda

**PIGTAIL**

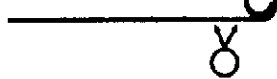

Pigtail


**PIGTAIL**



Pigtail, con ángulo de 145°

**TIGHT RADIUS**

**PIGTAIL**

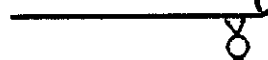

Pigtail, con radio estrecho

**CMKR**

**PIGTAIL**



Pigtail con cardiomarker


**PIGTAIL**



Pigtail, con ángulo de 155°

**TIGHT RADIUS**

**PIGTAIL 145°**

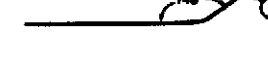

Pigtail, con ángulo de 145° y radio estrecho

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



**CMKR 145°  
PIGTAIL**

 Pigtail Cardio-Marker, con ángulo de 145°

**TIGHT RADIUS  
PIGTAIL 155°**

 Pigtail, con ángulo de 155° y radio estrecho

**CMKR 155°  
PIGTAIL**

 Pigtail Cardio-Marker, con ángulo de 155°

**MOD TIGHT  
RADIUS PIGTAIL  
145°**

 Pigtail, con ángulo de 145°, modificado y radio estrecho

**MOD II  
TIGHT RADIUS  
PIGTAIL 145°**

 Pigtail, con ángulo de 145°, 2, modificado y radio estrecho

**MOD TIGHT  
RADIUS PIGTAIL  
155°**

 Pigtail, con ángulo de 155°, modificado y radio estrecho

**MOD II  
TIGHT RADIUS  
PIGTAIL 155°**

 Pigtail, con ángulo de 155°, 2, modificado y radio estrecho

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.  
  
RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL


  
ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




**AL**  Curva Tipo Amplatz para coronaria izquierda

**MOD AR**  Curva Tipo Amplatz modificado para coronaria derecha

**AR**  Curva Tipo Amplatz para coronaria derecha

**ARANI**  Curva Arani

**BRACH**  Curva Braquial

**CHAMP\***  Curva Champ

**IMA**  Curva para arteria mamaria interna


**MOD IMA**  Curva, modificado para arteria mamaria interna


**LCB**  Curva para bypass de coronaria izquierda

**RCB**  Curva para bypass de coronaria derecha

  
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14043  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

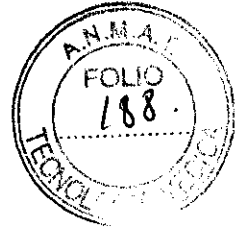

**MP A1**  
Curva Multiuso A-1

**MP A2**  
Curva Multiuso A-2

**MP B1**  
Curva Multiuso B-1

**MP B2**  
Curva Multiuso B-2

**NTR**  
Curva Sin torsión, para coronaria derecha

**SCHOONMKR MULTI**  
Curva Multiuso Schoonmaker

**3-DRC**  
Curva Tridimensional, para coronaria derecha

**SONES\* A**  
Curva Estilo A de Sones

**SONES\* B**  
Curva Estilo B de Sones

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.  
RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



Curva Estilo C de Sones

### **INDICACIONES:**

Los catéteres angiográficos cardiovasculares son catéteres intravasculares para diagnóstico que se utilizan para registrar presiones intracardíacas, tomar muestras de sangre e introducir sustancias en el corazón y en los vasos.

### **CONTRAINDICACIONES:**

No se conocen hasta el momento.

### **ADVERTENCIAS**

- Cuando la situación clínica indique que es razonable esperar una enfermedad ostial, la utilización de catéteres para diagnóstico de 5 F o menores deberá hacerse con precaución. Debido a la posibilidad de que los catéteres de 5 F o menores atraviesen una lesión ostial, la detección de la enfermedad ostial puede resultar más difícil.
- Cuando esté en el sistema vascular, el catéter deberá estar siempre lleno de solución de lavado o de medio de contraste para evitar o reducir la formación de coágulos y el riesgo de embolia gaseosa. Deberá considerarse la posibilidad de utilizar heparinización sistémica.
- Los catéteres angiográficos cardiovasculares deben usarse con guías para garantizar una introducción fácil del catéter.
- En ningún caso deberá introducir ni retirar el catéter si encuentra resistencia y no se ha determinado la causa mediante examen fluoroscópico.


### **PRECAUCIONES**

- Para prevenir acodamientos y proporcionar soporte al catéter pigtail de 4 F dentro del ventrículo izquierdo, utilizar una guía de 0,035 pulgadas.
- Utilice los catéteres antes de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del envase.

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

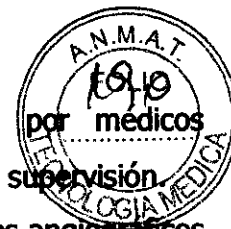

- Los catéteres angiográficos vasculares sólo deben ser utilizados por médicos familiarizados con los procedimientos angiográficos vasculares o bajo su supervisión.
- Se recomienda utilizar guías con recubrimiento de PTFE con los catéteres angiográficos cardiovasculares para aumentar la tromborresistencia y la lubricidad.
- Inspeccione cuidadosamente el catéter antes de usarlo para comprobar que su tamaño, forma y estado son adecuados para los procedimientos previstos.
- Almacene los catéteres en lugar seco y fresco.
- Estos catéteres se suministran en estado estéril y son apirógenos.
- Si el envase está abierto o dañado, no utilice el catéter.
- No vuelva a utilizar ni a esterilizar el catéter.
- Una vez usado, este producto puede constituir un riesgo biológico. Deberá manipularse y desecharse conforme a las prácticas médicas aceptadas y respetando las leyes locales correspondientes.

#### **ACONTECIMIENTOS ADVERSOS:**

- Lesión o perforación de la pared arterial o venosa, o de la pared del corazón
- Formación de trombos
- Desprendimiento de placa
- Embolia
- Oclusión vascular
- Arritmia cardíaca
- Infarto de miocardio
- Accidente cerebrovascular
- Muerte
- Hematoma en el sitio de punción
- Infección
- Reacción alérgica al medio de contraste

Esterilizado por óxido de etileno.

DT: Andrea Valentina Rodríguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55


MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

## **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Para evitar daños en el catéter, tenga cuidado al extraerlo de su envase.
2. Para retirar el estilete formador de punta si lo hubiera:
  - a. Sujete el estilete firmemente con una mano.
  - b. Sujete el extremo distal de la punta del catéter con dos dedos (vea la figura 1) o sujétela con dos uñas (vea la figura 2).
  - c. Gire el estilete y tire de él para sacarlo del catéter.

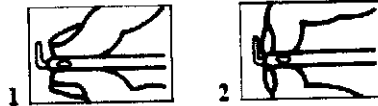

**Nota:** puede ser necesario manipular o soltar la parte distal del catéter en dirección proximal mientras se tira del estilete.

3. Los catéteres angiográficos cardiovasculares pueden introducirse en el vaso elegido mediante disección, la técnica de Seldinger o métodos que requieren el uso del introductor. Si se utiliza un introductor, compruebe que su tamaño en french es igual o superior al tamaño del catéter angiográfico elegido.

**Aviso:** cuando la situación clínica indique que es razonable esperar una enfermedad ostial, la utilización de catéteres para diagnóstico de 5 F o menores deberá hacerse con precaución. Debido a la posibilidad de que los catéteres de 5 F o menores atraviesen una lesión ostial, la detección de la enfermedad ostial puede resultar más difícil.

4. Para enderezar la curva del pigtail, haga avanzar el enderezador del pigtail (si lo hubiera) sobre la curva hasta que quede totalmente enderezada. Una vez insertada la curva del catéter en el introductor, retire o despegue el enderezador del pigtail.

5. Para retirar el enderezador del pigtail, desplácelo hacia el extremo proximal del catéter y tire de la lengüeta proximal para despegar el enderezador del catéter.

6. Se recomienda introducir el catéter angiográfico en el sistema vascular con una guía y hacerlo avanzar cuidadosamente mediante control fluoroscópico.

**Aviso:** Los catéteres angiográficos cardiovasculares deben usarse con guías para garantizar una introducción fácil del catéter.

**Aviso:** cuando esté en el sistema vascular, el catéter deberá estar siempre lleno de solución de lavado o de medio de contraste para evitar o reducir la formación de

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.





coágulos y el riesgo de embolia gaseosa. Deberá considerarse la posibilidad de utilizar heparinización sistémica.


**Aviso:** en ningún caso deberá introducir ni retirar el catéter si encuentra resistencia y no se ha determinado la causa mediante examen fluoroscópico.

7. Para la extracción del catéter, se recomienda volver a introducir la guía a fin de enderezar la punta. Retire lentamente el catéter y la guía con control fluoroscópico. Se recomienda aplicar aspiración durante la extracción.

**Aviso:** en ningún caso deberá hacer avanzar o retirar el catéter si encuentra resistencia y no se ha determinado la causa mediante examen fluoroscópico.

  
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14048  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

**ANEXO IIIB - RÓTULO**

Fabricado por **Availmed S.A. de C.V.**,

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H)  
G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o


**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

Importado por **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700

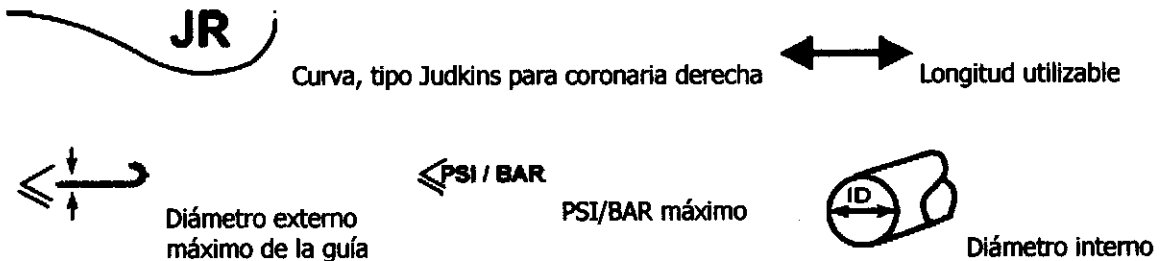**SiteSeer® 4F Cardiovascular Angiographic Catheters****Catéteres angiográficos cardiovasculares**

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**

**LOT**

LOTE N°



FECHA DE VENCIMIENTO



PRODUCTO DE UN SOLO USO.

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



*Lea las Instrucciones de Uso.*

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



**ANEXO IIIB - RÓTULO**

Fabricado por **Availmed S.A. de C.V.**,

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H) G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

Importado por **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700



**SiteSeer® 4F Cardiovascular Angiographic Catheters**

**Catéteres angiográficos cardiovasculares**

**Angio-Kit**



**JLI**

Curva Tipo Judkins 1 para coronaria izquierda




Longitud utilizable



Diámetro interno

PSI / BAR

PSI/BAR máximo

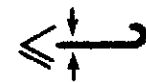

Diámetro externo máximo de la guía



**JR**

Curva, tipo Judkins para coronaria derecha




Longitud utilizable



Diámetro interno

PSI / BAR

PSI/BAR máximo

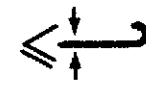

Diámetro externo máximo de la guía

**PIGTAIL**

**145°**



Pigtail, con ángulo de 145°



Longitud utilizable

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


7119



Diámetro interno

PSI / BAR

PSI/BAR máximo

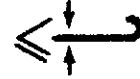

Diámetro externo  
máximo de la guía



CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**

**LOT**

LOTE N°



FECHA DE VENCIMIENTO

**PYROGEN**

Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



*Lea las Instrucciones de Uso.*

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

**ANEXO IIIB - RÓTULO**

Fabricado por **Availmed S.A. de C.V.**,

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H)  
G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

Importado por **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**


Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700



### SiteSeer® 5F Cardiovascular Angiographic Catheters

#### Catéteres angiográficos cardiovasculares

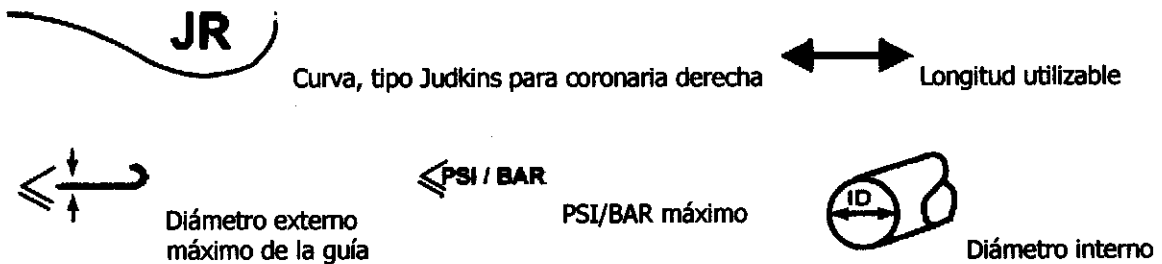

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**

**LOT**

LOTE N°



FECHA DE VENCIMIENTO



PRODUCTO DE UN SOLO USO.

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



Lea las Instrucciones de Uso.

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



**ANEXO IIIB - RÓTULO**

Fabricado por **Availmed S.A. de C.V.**,

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H)  
G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

Importado por **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro



Tel. +54-11-4898 5700



**SiteSeer® 5F Cardiovascular Angiographic Catheters**

**Catéteres angiográficos cardiovasculares**

**Angio-Kit**

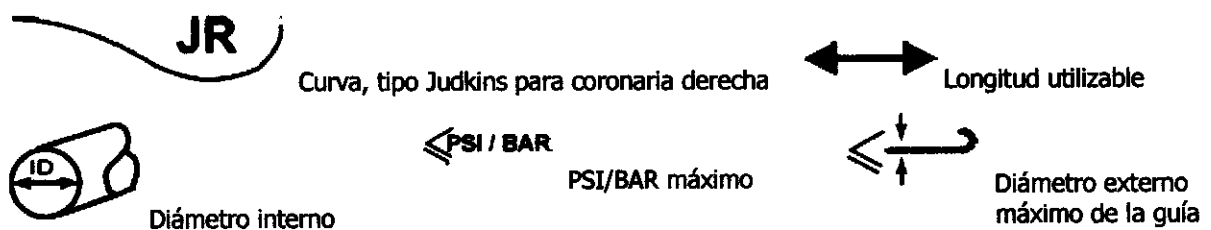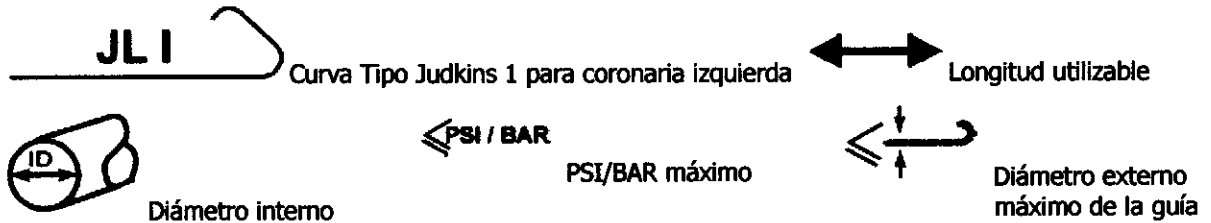

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.  
  
RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7 1 1 9



Diámetro interno



PSI/BAR máximo



Diámetro externo máximo



CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**



LOTE Nº



FECHA DE VENCIMIENTO



Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.



Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar. No doblar.



*Lea las Instrucciones de Uso.*

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14045

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

**ANEXO IIIB - RÓTULO**



*Fabricado por* **Availmed S.A. de C.V.,**

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H)  
G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

*Importado por* **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700




**SiteSeer® 5F Cardiovascular Angiographic Catheters**

**Catéteres angiográficos cardiovasculares**


**EZ-Pak® Kit**

**Kit del Introdutor del catéter percutáneo**

**5F Input®PS**  
1.67 mm

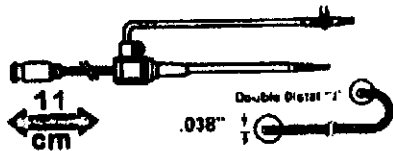

**Guía Angiográfica**

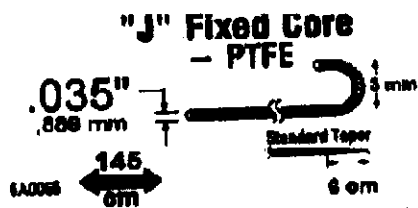

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 4045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.






Diámetro interno




PSI/BAR máximo

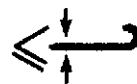

Diámetro externo máximo de la guía



Curva, tipo Judkins para coronaria derecha

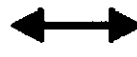

Longitud utilizable



Diámetro interno



PSI/BAR máximo



Diámetro externo máximo de la guía



Pigtail




Longitud utilizable



Diámetro interno



PSI/BAR máximo

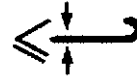

Diámetro externo máximo de la guía

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**

**LOT**

LOTE Nº



FECHA DE VENCIMIENTO

**PYROGEN** Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



*Lea las Instrucciones de Uso.*

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045


AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

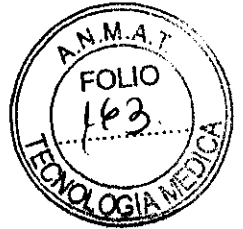

## ANEXO IIIB - RÓTULO

Fabricado por **Availmed S.A. de C.V.**,

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H) G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

Importado por **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**


Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700



### SiteSeer® 6F Cardiovascular Angiographic Catheters

Catéteres angiográficos cardiovasculares

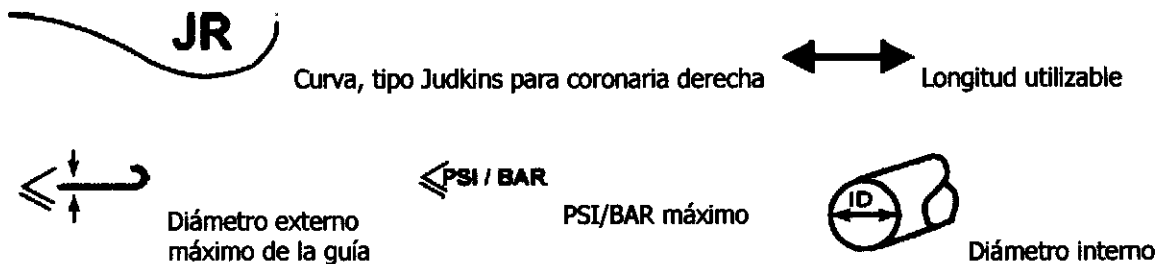

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**

**LOT**

LOTE N°



FECHA DE VENCIMIENTO



PRODUCTO DE UN SOLO USO.

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



*Lea las Instrucciones de Uso.*

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



**ANEXO IIIB - RÓTULO**

*Fabricado por Availmed S.A. de C.V.,*

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H)  
G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vasculuar**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

**Importado por MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro



Tel. +54-11-4898 5700



**SiteSeer® 6F Cardiovascular Angiographic Catheters**

**Catéteres angiográficos cardiovasculares**

**Angio-Kit**

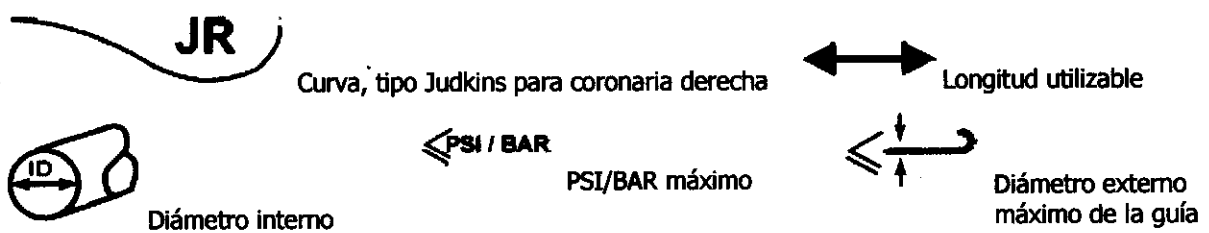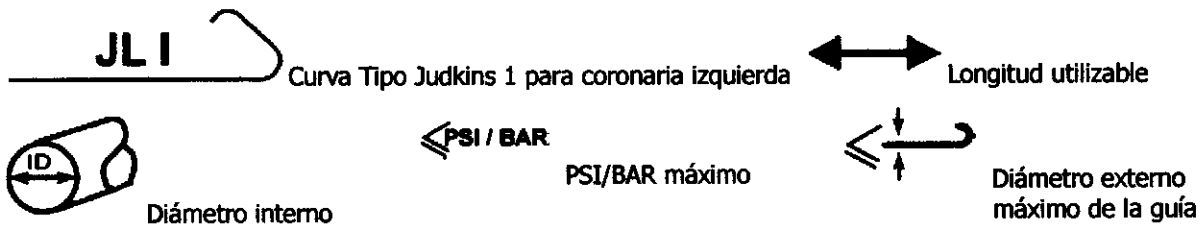

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
N.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


7 1 1 9



Diámetro interno



PSI/BAR máximo

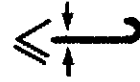

Diámetro externo máximo de la guía

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**



LOTE Nº



FECHA DE VENCIMIENTO



Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.



Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



*Lea las Instrucciones de Uso.*

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14045

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



**ANEXO IIIB - RÓTULO**

*Fabricado por Availmed S.A. de C.V.,*

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H) G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

*Importado por MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.*

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700




**SiteSeer® 6F Cardiovascular Angiographic Catheters**

**Catéteres angiográficos cardiovasculares**


**EZ-Pak® Kit**

**Kit del Introdutor del catéter percutáneo**

**6F Input®-PS**  
2.09 mm

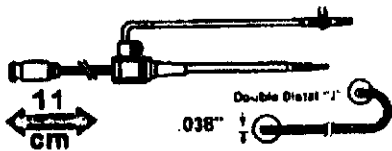

**Guía Angiográfica**

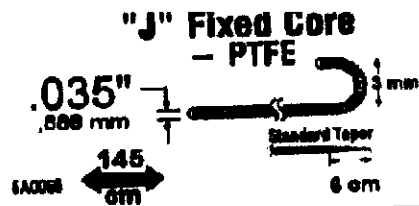

Curva Tipo Judkins 1 para coronaria izquierda



Longitud utilizable

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


7119



Diámetro interno



PSI/BAR máximo

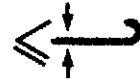

Diámetro externo máximo de la guía



Curva, tipo Judkins para coronaria derecha




Longitud utilizable



Diámetro interno



PSI/BAR máximo

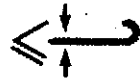

Diámetro externo máximo de la guía

**PIGTAIL**



Pigtail




Longitud utilizable



Diámetro interno



PSI/BAR máximo

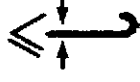

Diámetro externo máximo de la guía

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**



LOTE Nº



FECHA DE VENCIMIENTO

**PYROGEN** Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



Lea las Instrucciones de Uso.

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



## ANEXO IIIB - RÓTULO

Fabricado por **Availmed S.A. de C.V.**,

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H)  
G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascolar**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

Importado por **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**


Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700



### Pro-Flo® 6F Cardiovascular Angiographic Catheters

#### Catéteres angiográficos cardiovasculares

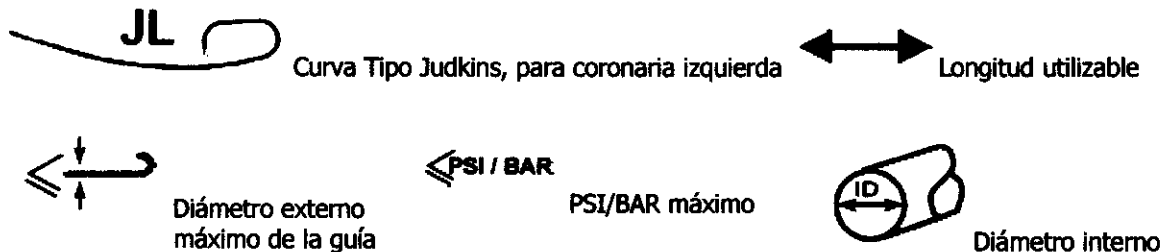

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**

**LOT** LOTE N°



FECHA DE VENCIMIENTO

**PYROGEN** Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



*Lea las Instrucciones de Uso.*

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

**ANEXO IIIB - RÓTULO**

Fabricado por **Availmed S.A. de C.V.**,

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H)  
G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

Importado por **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**


Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700



### Pro-Flo® 6F Cardiovascular Angiographic Catheters

Catéteres angiográficos cardiovasculares

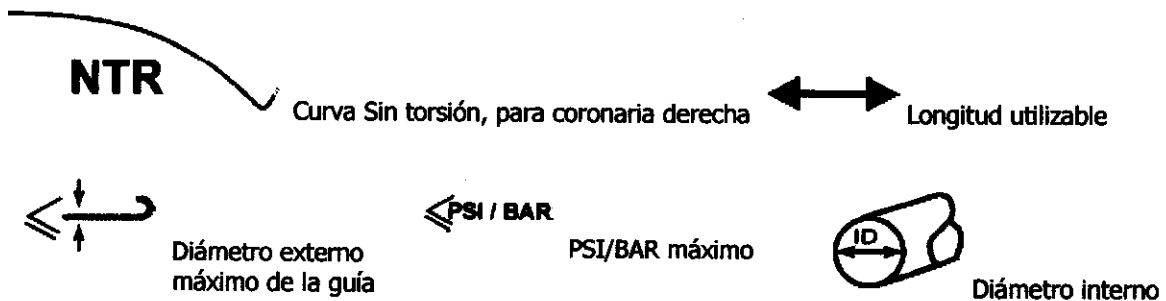

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**

**LOT** LOTE N°



FECHA DE VENCIMIENTO

**PYROGEN** Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.

**STERILE EO**  
Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



*Lea las Instrucciones de Uso.*

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.





## ANEXO IIIB - RÓTULO

Fabricado por **Avallmed S.A. de C.V.**,

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H)  
G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

Importado por **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**


Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700



### Pro-Flo XT® 6F Cardiovascular Angiographic Catheters

Catéteres angiográficos cardiovasculares

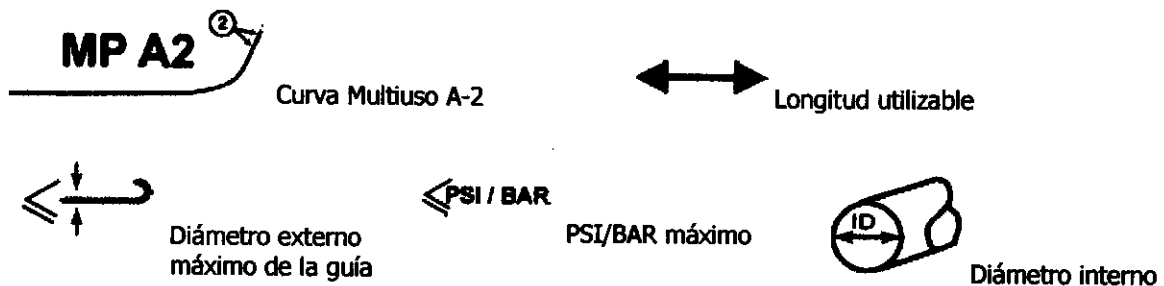

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**

**LOT** LOTE N°



FECHA DE VENCIMIENTO

**PYROGEN** Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



*Lea las Instrucciones de Uso.*

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



**ANEXO IIIB - RÓTULO**

*Fabricado por Availmed S.A. de C.V.,*

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H) G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

*Importado por MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.*

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700



**Pro-Flo XT® 6F Cardiovascular Angiographic Catheters**


**Catéteres angiográficos cardiovasculares**



Curva Tipo Judkins, para coronaria izquierda




Longitud utilizable

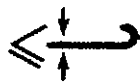

Diámetro externo máximo de la guía



PSI/BAR máximo

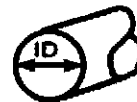

Diámetro interno

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**



LOTE N°



PRODUCTO DE UN SOLO USO.



FECHA DE VENCIMIENTO



Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



*Lea las Instrucciones de Uso.*

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ

DIRECTORA TÉCNICA

M.N. 14045

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



**ANEXO IIIB - RÓTULO**

*Fabricado por Availmed S.A. de C.V.,*

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H) G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

**Importado por MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro



Tel. +54-11-4898 5700



**Pro-Flo® 6F Cardiovascular Angiographic Catheters**

**Catéteres angiográficos cardiovasculares**

**Angio-Kit**

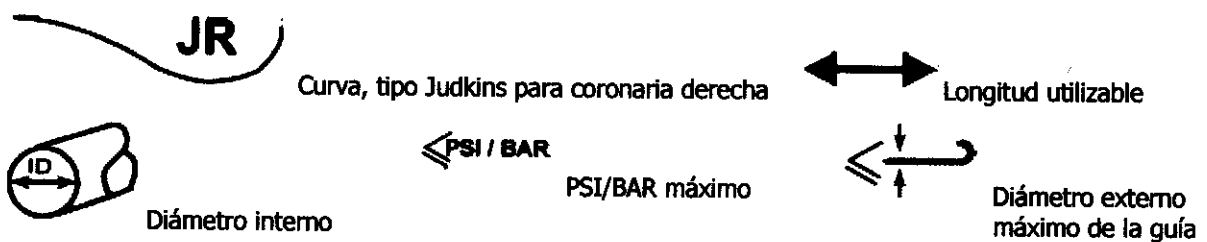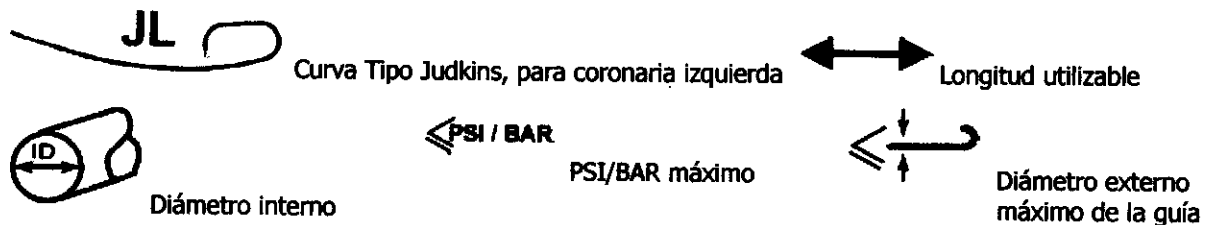


MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


7119

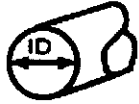

Diámetro interno

PSI / BAR

PSI/BAR máximo

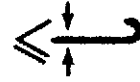

Diámetro externo  
máximo de la guía



CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**

**LOT**

LOTE Nº



FECHA DE VENCIMIENTO

**PYROGEN**

Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



*Lea las Instrucciones de Uso.*


DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATINAMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

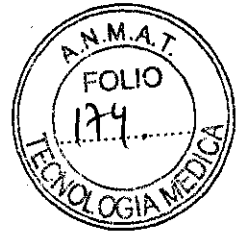

**ANEXO IIIB - RÓTULO**

*Fabricado por Availmed S.A. de C.V.,*

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H) G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

**Importado por MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700




**Pro-Flo® 6F Cardiovascular Angiographic Catheters**

**Catéteres angiográficos cardiovasculares**


**EZ-Pak® Kit**

**Kit del Introdutor del catéter percutáneo**

**6F Input®-PS**  
2.60 mm

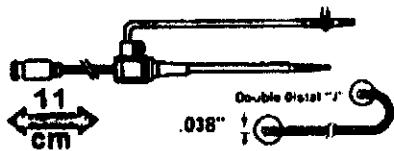

**Guía Angiográfica**

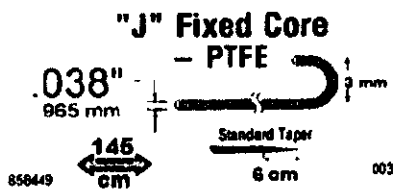

Curva Tipo Judkins, para coronaria izquierda


Longitud utilizable



Diámetro interno

PSI / BAR

PSI/BAR máximo

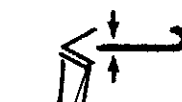


Diámetro externo máximo de la guía

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14645  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7119

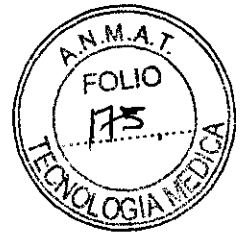

Curva, tipo Judkins para coronaria derecha




Longitud utilizable



Diámetro interno




PSI/BAR máximo

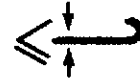

Diámetro externo máximo de la guía

**PIGTAIL**

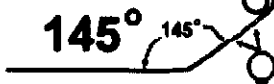

Pigtail, con ángulo de 145°




Longitud utilizable



Diámetro interno



PSI/BAR máximo

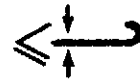

Diámetro externo máximo de la guía

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**



LOTE N°



FECHA DE VENCIMIENTO

**PYROGEN** Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



Lea las Instrucciones de Uso.

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



## ANEXO IIIB - RÓTULO

Fabricado por **Availmed S.A. de C.V.**,

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H)  
G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

Importado por **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700



### Pro-Flo® 7F Cardiovascular Angiographic Catheters


Catéteres angiográficos cardiovasculares



Curva Tipo Judkins, para coronaria izquierda



Longitud utilizable

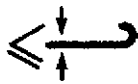

Diámetro externo  
máximo de la guía



PSI/BAR máximo



Diámetro interno

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**

**LOT**

LOTE N°

**PYROGEN** Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.



FECHA DE VENCIMIENTO

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



Lea las Instrucciones de Uso.

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7119



**ANEXO IIIB - RÓTULO**

Fabricado por **Availmed S.A. de C.V.**,

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H) G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

Importado por **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700



**Pro-Flo XT® 7F Cardiovascular Angiographic Catheters**


**Catéteres angiográficos cardiovasculares**



Curva Multiuso A-2



Longitud utilizable

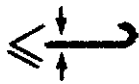

Diámetro externo máximo de la guía



PSI/BAR máximo



Diámetro interno

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**



LOTE N°



FECHA DE VENCIMIENTO

**PYROGEN** Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



Lea las Instrucciones de Uso.

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55


MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



7119

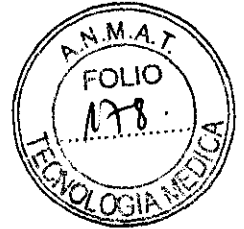

**ANEXO IIIB - RÓTULO**

*Fabricado por Availmed S.A. de C.V.,*

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H) G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

*Importado por MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.*


Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700



**Pro-Flo XT® 7F Cardiovascular Angiographic Catheters**

**Catéteres angiográficos cardiovasculares**

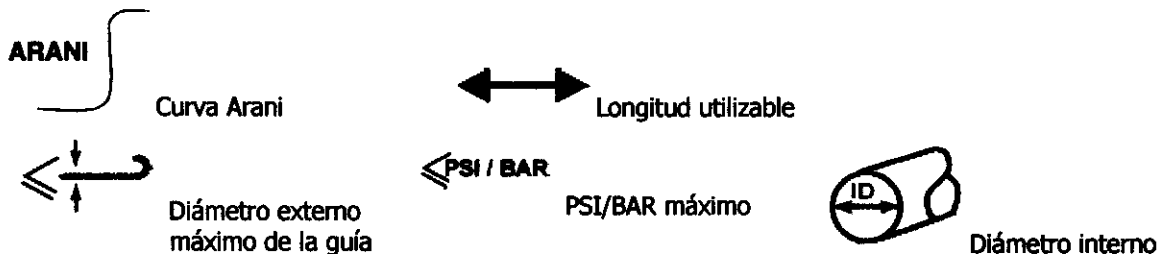

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**

**LOT** LOTE N°

**FECHA DE VENCIMIENTO**

**PYROGEN** Apirógeno

**PRODUCTO DE UN SOLO USO.**

**STERILE EO**  
Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.

**⚠** *Lea las Instrucciones de Uso.*

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



**ANEXO IIIB - RÓTULO**

*Fabricado por* **Avallmed S.A. de C.V.**,

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H) G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vascular**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

*Importado por* **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700



**Pro-Flo® 7F Cardiovascular Angiographic Catheters**

**Catéteres angiográficos cardiovasculares**

**Angio-Kit**



Curva Tipo Judkins, para coronaria izquierda


Longitud utilizable



Diámetro interno

PSI / BAR

PSI/BAR máximo

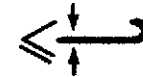

Diámetro externo máximo de la guía



Curva, tipo Judkins para coronaria derecha


Longitud utilizable



Diámetro interno


PSI / BAR

PSI/BAR máximo

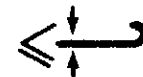

Diámetro externo máximo de la guía

**PIGTAIL**

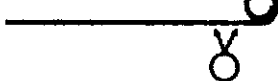

Pigtail

Longitud utilizable

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7119



Diámetro interno



PSI/BAR máximo



Diámetro externo máximo de la guía



CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**



LOTE Nº



FECHA DE VENCIMIENTO



Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.



Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



*Lea las Instrucciones de Uso.*

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA  
M.N. 14045

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



**ANEXO IIIB - RÓTULO**

*Fabricado por* **Availmed S.A. de C.V.,**

Ave, Paseo Reforma N° 8950, Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H)  
G2, La Mesa, Tijuana, Baja California 22116, MEXICO y/o

**Medtronic Vasculer**

37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA y/o

**Medtronic Inc.**

710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, USA

*Importado por* **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**

Fondo de la Legua 1044, 2° piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro

Tel. +54-11-4898 5700




**Pro-Flo® 7F Cardiovascular Angiographic Catheters**


**Catéteres angiográficos cardiovasculares**

**EZ-Pak® Kit**

**Kit del Introdutor del catéter percutáneo**

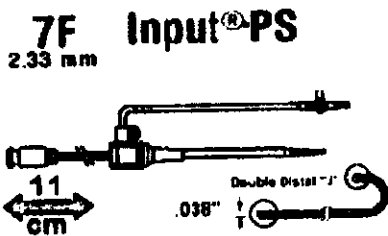

**Guía Angiográfica**

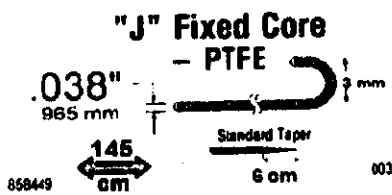

Curva Tipo Judkins, para coronaria izquierda



Longitud utilizable

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA

M.N. 14048  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


7119



Diámetro interno

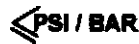

PSI/BAR máximo

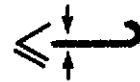


Diámetro externo máximo de la guía



Curva, tipo Judkins para coronaria derecha



Longitud utilizable

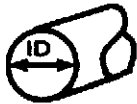

Diámetro interno



PSI/BAR máximo



Diámetro externo máximo de la guía

**PIGTAIL**

145°




Pigtail, con ángulo de 145°




Longitud utilizable



Diámetro interno

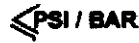

PSI/BAR máximo

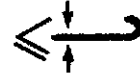

Diámetro externo máximo de la guía

CONTENIDO: 1; 5 y 10 unidades.

CONDICIÓN DE VENTA:

PRODUCTO ESTÉRIL.

**REF**

**LOT**

LOTE Nº



FECHA DE VENCIMIENTO

**PYROGEN** Apirógeno



PRODUCTO DE UN SOLO USO.

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.

Almacenar en lugar seco y fresco. No doblar.



Lea las Instrucciones de Uso.

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-55

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

RICARDO SANCHEZ MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten signature of Andrea Rodriguez*

ANDREA RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.N. 14045  
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas, Regulación*  
*e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

**ANEXO III**

**CERTIFICADO**

**Expediente Nº: 1-47-21466-09-7**

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **7119**, y de acuerdo a lo solicitado por Medtronic Latin América, se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Catéteres angiográficos cardiovasculares

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 10-688 - Catéteres, para Angiografía

Marca de (los) producto(s) médico(s): MEDTRONIC

Clase de Riesgo: Clase IV

Indicación/es autorizada/s: registrar presiones intracardiácas, tomar muestras de sangre e introducir sustancias en el corazón y en los vasos.

Modelo/s: SiteSeer y Pro-Flo.

**SITeseer 4F:**

SITeseer JR 3.5, 4.0, 5.0 y 6.0 100 cm y JR 4.0 125 cm

SITeseer MOD JR 4.0 100 cm

SITeseer NTR 100 cm

SITeseer 3D RC 100 cm

SITeseer CP 0,5, 1.0 y 3.0 SITeseer 100 cm

SITeseer JL 3.5I, 4.0I, 4.5I, 5.0I y 6.0I 100 cm y JL 4.0 125 cm

SITeseer CHP 3.5 SITeseer 100 cm

SITeseer AR I y II 100 cm

SITeseer AL I, II y III 100 cm

SITeseer MP A-1, A-2, B-1, B-2 100 cm y 110 cm

SITeseer STR TR PIGTAIL 125 cm

SITeseer 145 y 155 DEG PIGTAIL 125 cm

SITeseer TGHT RAD PIG 110 cm

SITeseer TGHT RAD PIG 145DG y 155 DG 110

SITeseer IMA 100 cm

SITeseer LCB 100 cm  
SITeseer RCB 100 cm  
SITeseer BRACHIAL 3.5, 4.0 y 4.5  
SITeseer SONES A, B y C y SONES A, B y C 80 cm  
SITeseer ARANI I y II  
SITeseer CHAMP 0.5, 1.0, 3.0 y 3.5 110 cm  
SITeseer BRACHIAL 3.5, 4.0 y 4.5 80 cm  
SITeseer EL GAMAL 1  
SITeseer AK W/STRAIGHT PIGTAIL  
SITeseer AK W/145 y 155 DEGREE PIGTAIL  
SITeseer AR MOD  
SITeseer ANGIO KIT W/3D RIGHT  
SITeseer ANGIOKIT y ANGIOKIT W/155 PIG  
SITeseer CATHETER 04SR008 SS MOD. STR. PTAIL, 04SR009 SS MOD. 145  
PTAIL SI y 04SR011 SS STR. 125 cm

SITeseer 5F:

SITeseer JR 3.5, 4.0, 4.0I, 5.0 y 6.0 100 cm y JR 4.0I SS 125 cm  
SITeseer MOD JR 4.0 100 cm  
SITeseer NTR 100 cm  
SITeseer 3D RC 100 cm  
SITeseer CHP 0.5, 1.0, 3.0 y 3.5 SITeseer 100 cm  
SITeseer JL 3.5, 3.5I, 4.0, 4.0I, 4.5, 4.5I, 5.0, 5.0I y 6.0I 100 cm y JL 4.0, 4.0I  
125 cm  
SITeseer AR I y II 100 cm  
SITeseer AL I, II y III 100 cm  
SITeseer MP A-1, A-2, B-1, B-2 100 cm y 110 cm  
SITeseer STR TGHT RAD PIG 110 cm  
SITeseer TGHT RAD PIG 145DG y 155 DG 110  
SITeseer IMA 100 cm  
SITeseer LCB 100 cm  
SITeseer RCB 100 cm  
SITeseer BRACHIAL 3.5, 4.0 y 4.5 100 cm  
SITeseer SONES A, B y C 100 cm y SONES A, B y C 80 cm  
SITeseer ARANI I y II SS 100 cm  
SITeseer CHAMP 0.5 SS, 1.0, 3.0 y 3.5 110 cm  
SITeseer BRACHIAL 3.5, 4.0 y 4.5 80 cm  
SITeseer EL GMAL SITeseer 100 cm  
SITeseer AK W/STR PG, W/145 ANG y W/155 PIGTAIL  
SITeseer EZPAK W/INP STR PGT, W/145 PGT INP y W/155 PGTL INP  
SITeseer AR MOD SITeseer 100 cm  
SITeseer STRD STR PIG 110 cm y 125 cm  
SITeseer STRD 145DEG PIG y 155 DEG PIG 110 cm  
SITeseer AK W/3DRC 145  
SITeseer EZPK W/STR PG 3DRC INP, W/ST y 145 PIG 0.038 INP  
SITeseer ANGIOKIT  
SITeseer BTO SITeseer CHOICEPAK  
SITeseer BTO EZ PAK



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas, Regulación*  
*e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

SITeseer BTO CHOICEPAK  
SITeseer BTO ANGIOKIT  
SITeseer EZPAK  
SITeseer BTO EZPAK W/145 P, W/3DRC y W/O PIG  
SITeseer CATHETER SS CASTILO 1.5 100 cm  
SITeseer CATHETER SS MEENGs 100 cm  
SITeseer CATHETER SS BLANC CURVE 100 cm  
SITeseer CATHETER SS JL 5.0, 6.0 y 7.0 125 cm  
SITeseer CATHETER SS JR 5.0 y 6.0 125 cm  
SITeseer CATHETER SS AL 3.0 125 cm  
SITeseer CATHETER SS AL II 125 cm SPL  
SITeseer CATHETER SS MB2 125 cm SPL SIT  
SITeseer CATHETER SS STR PTAIL 110 cm  
SITeseer CATHETER SS MODIFIED JL 4.0 10  
SITeseer CATHETER SS ALCEBO, T RAD  
SITeseer CATHETER SS MOD MP 100 cm SP  
SITeseer CATHETER SS SIMMONS II 100 cm  
SITeseer CATHETER SS MAC 3.0 100 cm SI  
SITeseer CATHETER SS AL 1.0 125 cm SIT  
SITeseer CATHETER SS 145 cm PIGTAIL OSH  
SITeseer CATHETER SS CATH. DIAG. VDL-1, VDL-2 y VDL-3  
SITeseer CATHETER SS CATH. DIAG. VDR-1, VDR-2 y VDR-3  
SITeseer CATHETER SS MP A-2 125 cm SI  
SITeseer CATHETER SS CATH. DIAG. SFSPL  
SITeseer CATHETER SS STR PTAIL W/12 SH  
SITeseer CATHETER SS MP B-1 80 cm

SITeseer 6F:

SITeseer JR 3.5, 4.0, 4.0I, 4CC, 5.0 y 6.0 100 cm y JR 4.0, 4.0I 125 cm  
SITeseer MOD JR 4.0 100 cm  
SITeseer NTR 100 cm  
SITeseer 3D RC 100 cm  
SITeseer CP 0,5, 1.0, 3.0 y 3.5 cm SITeseer 100 cm  
SITeseer JL 3.5, 3.5I, 4.0, 4.0I, 4.5, 4.5I, 5.0, 5.0I y 6.0I 100 cm y JL 4.0, 4.0I 125 cm  
SITeseer AR MOD, I y II 100 cm  
SITeseer AL I, II y III 100 cm  
SITeseer MP A-1, A-2, B-1, B-2 100 cm  
SITeseer STR XT PIG 125 cm 6SH y PIGTL 110 cm 12SH  
SITeseer 145DG PIGTL 110 cm 12SH y 6SH y 155DG PIGTL 110 cm  
SITeseer STR PIGTL 110 cm 6SH  
SITeseer IMA 110 cm  
SITeseer LCB 100 cm  
SITeseer RCB 100 cm  
SITeseer BRACHIAL 3.5, 4.0 y 4.5 100 cm y 80 cm



SITeseer SONES A, B y C 100 cm y SONES A, B y C 80 cm  
SITeseer ARANI I y II 100 cm  
SITeseer CHAMP 0.5, 1.0, 3.0 y 3.5 110 cm  
SITeseer MP A-1, A-2, B-1, B-2 110 cm  
SITeseer EL GAMAL SITeseer 100 cm  
SITeseer ANGIOKIT W/STRPGTL, W/145 PGTL y W/155 PGTL  
SITeseer EZPAK W/STR PG 0.035INP, W/145 y 155 PG 0.035INP  
SITeseer XT STRD STR PIGTL 110 cm  
SITeseer XT 145DEG y 155DEG PIGTL 110 cm  
SITeseer ANGIOKIT W/3DRC & XT, W/STR XT6SH, W/145 XT 6SH  
SITeseer EZPK W/3DRC XT 0.035INP, W/0.038 INP STRPG y 145 PIG 0.038  
INP  
SITeseer XT STR y 145DE PIGTL 6SH 110 cm  
SITeseer STR PGTL 110 cm y 125 cm 6 SH  
SITeseer XT TR y TR145 PIG 6SH 110 cm  
SITeseer EZPAK W/STR XT6SH 0.035 y 0.038  
SITeseer EZPAK W/145 6SH 0.035INP y 0.038INP, W/3DRC 0.035INP, 0.035INP  
SITeseer ANGIOKIT W/3DRC y 145  
SITeseer BTO ANGIOKIT, W/145  
SITeseer BTO EZ PAK  
SITeseer BTO EZPAK, W/145 P, W/3DRC  
SITeseer ANGIOKIT  
SITeseer BTO CHOICEPAK  
SITeseer BTO SITeseer EZ PAK  
SITeseer BTO EZ PAK  
SITeseer CATHETER SS JL3.0 100 cm  
SITeseer CATHETER SS JR 3.0 100 cm  
SITeseer CATHETER SSCOLLINS 70 mm TIP 1  
SITeseer CATHETER SSGENSINI 125 cm SP  
SITeseer CATHETER SSEBU 4.0 100 cm SPL  
SITeseer CATHETER SS  
SITeseer CATHETER SS AL II 125 cm 70SPL  
SITeseer CATHETER SS JR 5.0 125 cm SPL  
SITeseer CATHETER SS MP A-2 125 cm SPL  
SITeseer CATHETER SS AL IV 100 cm SPL  
SITeseer CATHETER SS JL 5.0 125 cm SPL  
SITeseer CATHETER SS AL III 125 cm SPL  
SITeseer CATHETER SS MAC 3.5 100 cm  
SITeseer CATHETER SS CHAMP 2.0 100 cm  
SITeseer CATHETER SS EBU 3.5 100 cm SPL  
SITeseer CATHETER SS JL 3.0 100 cm SPL  
SITeseer CATHETER SS BRACHIAL 3.5 OSH 1  
SITeseer CATHETER SS BRACHIAL 4.0 OSH 1  
SITeseer CATHETER SS MAC 4.0 y 4.5 100 cm S  
SITeseer CATHETER SS SIMMONS III SITE

PRO-FLO 6F:

PRO-FLO BTO CHOICEPAK





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas, Regulación*  
*e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

PRO-FLO SFT TIP BTO CHOICEPAK  
PRO-FLO ST BTO CHOICEPAK  
PRO-FLO ST XT CHOICEPAK  
PRO-FLO BTO CHOICEPACK INPUT  
PRO-FLO ST A-K W/HEMA II  
PRO-FLO PF ST CHOICEPAK  
PRO-FLO CHOICEPAK  
PRO-FLO BTO CHOICE 3 CATH INPUT S  
PRO-FLO TO CHOICE W/INPUT  
PRO-FLO BTO CHOICEPACK 3 CATH INPUT  
PRO-FLO BTO CHOICEPACK INPUT SHEAT  
PRO-FLO BTO CHOICEPACK INPUT  
PRO-FLO BTO-FLO XT CHOICEPACK  
PRO-FLO ST XT EZ-PAK  
PRO-FLO BTO EZ W/0.035 y 0.038 WIRE  
PRO-FLO EZ-PAK  
PRO-FLO ST EZ-PAK  
PRO-FLO ST A-K 7F EXL  
PRO-FLO 6F PF EZ-PAK  
PRO-FLO BTO EZ PAK  
PRO-FLO BTO KIT  
PRO-FLO ANGIO KIT  
PRO-FLO ST ANGIO KIT  
PRO-FLO SOFT TIP W/NTR  
PRO-FLO XT ANGIO KIT  
PRO-FLO ANGIO KIT BTO  
PRO-FLO ST XT A-K  
PRO-FLO ST A-K  
PRO-FLO ST XT ANGIO KIT  
PRO-FLO ST ANGIOKIT  
PRO-FLO ANGIOKIT W/145 DEG. PIGT  
PRO-FLO ST CHOICEPAK  
PRO-FLO EZ W/0.035 WIRE/IN S  
PRO-FLO BTO KIT JR 3.5 PIG 145 WI  
PRO-FLO ST MULTI A-2 2SH 5M  
PRO-FLO JL 3.5, 4.5 y 6 ST 100 cm  
PRO-FLO ST JR 4 125 cm  
PRO-FLO ST JL 4.5 100 cm  
PRO-FLO ST MULTI A-2 y A-1 12S cm  
PRO-FLO SOFT TIP JR 3.5, 4 y 5  
PRO-FLO JR 6 ST 100 cm  
PRO-FLO ST JR 4M  
PRO-FLO SOFT TIP M A RIGHT  
PRO-FLO SOFT TIP TORQUE RIGHT  
PRO-FLO SOFT TIP JL 3.5, 4 y 5

PRO-FLO SOFT TIP AR-1 y II  
PRO-FLO SOFT TIP AL 1 y II  
PRO-FLO SOFT TIP IMA  
PRO-FLO SOFT TIP BYP LEFT  
PRO-FLO SOFT TIP RIGHT BYPASS  
PRO-FLO SOFT TIP MULTI A-1  
PRO-FLO W/ST MP B-1 y B-2  
PRO-FLO XT JL 6 ST 100 cm  
PRO-FLO XT JR 6 ST 100 cm  
PRO-FLO 100 JR-4 XT ST  
PRO-FLO 100 JR-3.5 y 5 ST XT  
PRO-FLO ST JR 4M  
PRO-FLO ST XT MULTI  
PRO-FLO 100 MD AMP RT ST XT PF  
PRO-FLO ST XT NO TORQUE R  
PRO-FLO XT W/ST MP B-1  
PRO-FLO XT ACTIVE  
PRO-FLO XT ARANI SFTP  
PRO-FLO 100 JL 3.5, 4, 5 ST XT  
PRO-FLO 100 AR I y II ST XT  
PRO-FLO 100 AL I y II ST XT  
PRO-FLO 100 L BYP ST XT  
PRO-FLO 100 R BYP ST XT  
PRO-FLO 100 IMA ST XT  
PRO-FLO 100 MP A1 y A2 ST XT  
PRO-FLO ST XT JL 4.5 100 cm  
PRO-FLO ST XT AL III 100 cm  
PRO-FLO XT ST JL 4 125 cm  
PRO-FLO TIGHT RAD 9 SH  
PRO-FLO 145D y 155D 9 SH  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY JR 3.5, 4, 5  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY JL 4 y 5  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY AR I y AR II  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY AL I y AL II  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY L BYPASS  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY R BYPASS  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY MULTI A1 y A2  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY IMA TYPE  
PRO-FLO ANGIOGRAPHY  
PRO-FLO PGTL 6 SIDE HL  
PRO-FLO 145 PGTL 6 SIDE HL  
PRO-FLO 145 ANG PIGTAIL  
PRO-FLO 100 cm 155DEG ANG PIGTAIL  
PRO-FLO TGT RAD PIGTAIL  
PRO-FLO MULTI A-2 W/2.5 cm y 3 cm TIP  
PRO-FLO AL III 100 cm  
PRO-FLO 110 MULTI A-2 XT  
PRO-FLO XT PGTL 6 SDHL



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas, Regulación*  
*e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

PRO-FLO XT 145 PGTL 6SH  
PRO-FLO 110 PIGTAIL XT  
PRO-FLO 110 145 PIGTAIL XT  
PRO-FLO XT 155 ANG  
PRO-FLO 145DG ANGLE TR PG  
PRO-FLO XT145 ANGLE TR P  
PRO-FLO XT PIGTAIL ST 125 cm  
PRO-FLO PFXT PGTL 614D 125C  
PRO-FLO STR PGTL 110cm 12SH y 6SH  
PRO-FLO 145DG PGTL 110cm 2SH y 6SH  
PRO-FLO 155DG PGTL 110cm  
PRO-FLO EZPAK 0.035 INP  
PRO-FLO STR PGTL 125cm 6SH  
PRO-FLO XT STRD PGTL 110  
PRO-FLO 145DEG y 155 DE PGTL 110cm  
PRO-FLO XT STR PIGTL 6SH 110cm y 125 cm  
PRO-FLO XT 145DE PIG 6SH 110cm  
PRO-FLO XT TR PIG 6SH 110cm  
PRO-FLO XT TR145 PIG 6SH 110cm  
PRO-FLO AL II 100 cm 6SH  
PRO-FLO AL II 120 cm SPL  
PRO-FLO AL IV 100 cm  
PRO-FLO AR I 120 cm SPL  
PRO-FLO AR III 100 cm  
PRO-FLO CASTILLO I 100 cm SPL  
PRO-FLO CASTILLO II 100 cm  
PRO-FLO JL 4.0 120 cm  
PRO-FLO PL JL 4.0 125 cm SPLC  
PRO-FLO SPECIAL  
PRO-FLO JR 4.0 120 cm  
PRO-FLO PGTL 145 DEG 120 cm  
PRO-FLO 145DEG PGTL 6SH 125cm  
PRO-FLO 125 cm PGTL SPECIAL  
PRO-FLO MULTI 5 mm HIGHER SP  
PRO-FLO JL 6.0 125 cm SPL  
PRO-FLO JR 4, 5 y 6 125 cm  
PRO-FLO IMA SPECIAL  
PRO-FLO MULTI A-1 125 cm SPL  
PRO-FLO AL III 100 cm SPL  
PRO-FLO BERENSTEIN 110 cm SP  
PRO-FLO JR 6.0 100 cm SPL  
PRO-FLO MP A-2 120 cm SPECIAL  
PRO-FLO TGT RAD PIGTAIL 125 cm  
PRO-FLO JL6 4SH 100 cm  
PRO-FLO TIGHT RADIUS U CURVE PIG

PRO-FLO AL III 125 cm SPL  
PRO-FLO SOFT TIP SPL  
PRO-FLO SOFT TIP ALIV 100 cm SPL  
PRO-FLO SOFT TIP SPECIAL  
PRO-FLO ST ARI 125 cm  
PRO-FLO ST CHAMP 3.0 100 cm  
PRO-FLO 6 FRENCHSOFT TIP  
PRO-FLO ST JL 5 125 cm SPL  
PRO-FLO ST JR 6.0 120 cm  
PRO-FLO JR 6.0 125 cm SP  
PRO-FLO ST MULTI B1 y B2 125 cm  
PRO-FLO ST 100 cm SHORT BYPA  
PRO-FLO ST WILLIAMS L/R 100  
PRO-FLO ST JL 5.0 115 cm SPL  
PRO-FLO P/F EL GAMAL SPL  
PRO-FLO ST MODIFIED JL 5.0 SPL  
PRO-FLO ST EL GAMAL 4.5 SPL  
PRO-FLO ST JL 4.0 W/SPL 2SH  
PRO-FLO ST PURZYCKI CURVE  
PRO-FLO ST JL 5.0 120 cm SPL  
PRO-FLO ST LIMA 100 cm SPL  
PRO-FLO ST JR 4.0 15 DEG 30 mm  
PRO-FLO ST JL 3.0 100 cm  
PRO-FLO ST JR 3.0 100 cm  
PRO-FLO ST AL 1.5 100 cm  
PRO-FLO ST HOCKEY STICK 100 cm  
PRO-FLO ST AR II 125 cm SPL  
PRO-FLO JR 4.0 W/4 cm BEN  
PRO-FLO ST MODIFIED JL 6.0  
PRO-FLO ST JL 7.0 100 cm SPL  
PRO-FLO ST BERENSTEIN  
PRO-FLO XT VAN TASSEL PIGT  
PRO-FLO XT SPECIAL  
PRO-FLO XT STRAIGHT PIG 110  
PRO-FLO XT MPA2 W/7mm SPL  
PRO-FLO 145DEG PGTL 125cm  
PRO-FLO XT MPA2 100  
PRO-FLO XT BERENSTEIN 110 cm  
PRO-FLO XT JR 4.0 125 cm SPL  
PRO-FLO AL 1.0 125 cm SPL PL  
PRO-FLO XT AL IV 100 cm SPL  
PRO-FLO XT JL 3.0 100 cm SPL  
PRO-FLO XT JR 3.0, 4.5 100 cm SPL  
PRO-FLO XT AR III 120 cm SPL  
PRO-FLO ST XT AL II 125 cm SPL  
PRO-FLO ST XT AR I 125 cm  
PRO-FLO SOFT TIP XT SPECIAL  
PRO-FLO ST XT FL 3.5 cm SPL



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas, Regulación*  
*e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

PRO-FLO ST XT MPA2 125 cm  
PRO-FLO ST XT CHAMP 2.0 100 cm  
PRO-FLO ST XT JR 4.0 50 cm  
PRO-FLO ST XT MPA2 50 cm SP

PRO-FLO 7F:

PRO-FLO ST CHOICEPAK  
PRO-FLO BTO CHOICEPAK  
PRO-FLO CHOICEPAK  
PRO-FLO ST XT CHOICEPAK  
PRO-FLO EZ-PAK  
PRO-FLO ST EZ-PAK  
PRO-FLO SOFT TIP EZ-PAK  
PRO-FLO ST XT EZ-PAK  
PRO-FLO PS ST XT EZ-PAK  
PRO-FLO XT EZ-PAK  
PRO-FLO BTO EZ PAK  
PRO-FLO EZ-PAK 0.035 WIRE/INPUT  
PRO-FLO ANGIO KIT  
PRO-FLO ST ANGIO KIT  
PRO-FLO XT ANGIO KIT  
PRO-FLO SOFT TIP W/NTR  
PRO-FLO STFL XT ANGIO W/NTR  
PRO-FLO BTO ANGIOKIT  
PRO-FLO ST XT ANGIO KIT  
PRO-FLO ST MULTI A-2 110 cm y 125 cm  
PRO-FLO JR 3.5 y 4 SOFT TIP  
PRO-FLO SOFT TIP JR 5  
PRO-FLO ST JL 6, 4.5 100 cm  
PRO-FLO JL 3.5, 4.0 y 5 SOFT TIP  
PRO-FLO ARI y II SOFT TIP  
PRO-FLO ALII SOFT TIP  
PRO-FLO L BYPASS TIP  
PRO-FLO RT BYPASS SOFT  
PRO-FLO SOFT TIP IMA  
PRO-FLO MULTI A1 Y A2 SOFT TIP 100 cm  
PRO-FLO SOFT TIP AL1  
PRO-FLO W/ST MP B-1 y B-2  
PRO-FLO SOFT TIP NO TORQUE R  
PRO-FLO MOD AMPLATZ RT ST  
PRO-FLO ST JR 4M  
PRO-FLO ST AL III 100 cm  
PRO-FLO JL 4 100 cm W/SOFT TIP  
PRO-FLO XT JR 6 ST 100  
PRO-FLO JR 3.5, 4 y 5 SOFT TIP XT  
PRO-FLO ST XT NO TORQUE R

7 1 1 9

PRO-FLO MOD AMPLATZ RT ST XT  
PRO-FLO XT B-1 y B-2 SOFT TIP  
PRO-FLO XT ARANI W/SOFT TIP  
PRO-FLO ST JL 3.5, 4 y 5 XT  
PRO-FLO AR I y II SOFT TIP XT  
PRO-FLO AL I y II SOFT TIP XT  
PRO-FLO L BYPASS ST XT  
PRO-FLO R BYPASS ST XT  
PRO-FLO IMA ST XT  
PRO-FLO MP A-1 ST XT  
PRO-FLO XT ST JR 4 M  
PRO-FLO PF ST XT JL 4.5 100 cm  
PRO-FLO ST XT MP A-2  
PRO-FLO XT JL 6 ST 100  
PRO-FLO ST JR 6 100 cm  
PRO-FLO 100 JL 3.5, 4 y 5  
PRO-FLO 100 JR 3.5, 4 y 5  
PRO-FLO 100 AR I y II  
PRO-FLO 100 AL I y II  
PRO-FLO 100 LEFT BYPASS  
PRO-FLO RIGHT BYPASS  
PRO-FLO 100 IMA  
PRO-FLO 100 MULTI A-1  
PRO-FLO PGTL 6 SDHL  
PRO-FLO 145 PGTL 6 SDH  
PRO-FLO PIGTAIL  
PRO-FLO ANGL PIGTL 145 y 155 DEG  
PRO-FLO MULTI A2 110 cm  
PRO-FLO MP A-2 XT  
PRO-FLO PIGTAIL 6 SDHL  
PRO-FLO XT 145 PGTL 6 SH  
PRO-FLO 110, 125, 145 y 155 PIGTAIL XT  
PRO-FLO TIGHT RAD PIGTAIL  
PRO-FLO XT 145 ANG TIGHT RAD  
PRO-FLO XT SPECIAL  
PRO-FLO JL 4.0 125 cm SPL  
PRO-FLO JL 4.5 100 cm SPL  
PRO-FLO JR 4.0 125 cm SPL  
PRO-FLO SPECIAL  
PRO-FLO 145 PGTL 110 cm NO SI  
PRO-FLO PIGTAIL 90 cm 12 SH  
PRO-FLO TIGHT RADIUS PIG 11  
PRO-FLO 120 DEG PIGTAIL 110  
PRO-FLO TIGHT RADIUS PIGTAIL SPECIAL  
PRO-FLO BERENSTEIN 110 cm SP  
PRO-FLO BERENSTEIN 65 cm y 50 cm SPL  
PRO-FLO 120 DEG PIGTAIL 8SH  
PRO-FLO BERENSTEIN W/10



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas, Regulación*  
*e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

PRO-FLO SOFT TIP SPL  
PRO-FLO ST AL IV 100 cm  
PRO-FLO ST JL 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 y 8.0 125 cm SPL  
PRO-FLO ST JR 4.0, 5.0 y 6.0 125 cm SPL  
PRO-FLO ST MULTI B2 125 cm  
PRO-FLO ST AL III 100 cm  
PRO-FLO ST JR4 4.0 cm BENT TIP  
PRO-FLO ST JR4 2.5 cm BENT TIP  
PRO-FLO ST AL I, II y III 125 cm  
PRO-FLO ST JL 3.5 125 cm  
PRO-FLO SIMMONS II y III 100 cm  
PRO-FLO ST 125 cm SONES A  
PRO-FLO STRAIGHT PIGTAIL  
PRO-FLO XT BERENSTEIN 110 cm  
PRO-FLO ST XT JR 4.0 125 cm  
PRO-FLO ST XT JR 5.0 125 cm SPL  
PRO-FLO XT SONES C 100 cm  
PRO-FLO ST XT NO TORQUE  
PRO-FLO ST XT SPL  
PRO-FLO ST XT AL I 125 P  
PRO-FLO ST XT McCROSSAN 100 cm

Período de vida útil: 36 meses

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: 1) Availmed S.A. de C.V.

2) Medtronic Vascular

3) Medtronic Inc.

Lugar/es de elaboración: 1) Avenida Paseo Reforma N° 8950 Interior Edificio (B1, C1, E1, E2, F2, G1 (local A, B, C, G, H) G2, La Mesa, Tijuana, Baja California, México 22116.

2) 37A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923 US, Estados Unidos.

3) 710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, MN 55432, Estados Unidos.

Se extiende a Medtronic Latin América Inc. el Certificado PM 1842-55, en la Ciudad de Buenos Aires, a <sup>12 NOV 2010</sup>....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N° **7119**

sd

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.