



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

6823

BUENOS AIRES, 20 NOV 2012

VISTO el Expediente N° 1-47-6808-12-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Acryl-ar S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 6823

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca BEYOND, nombre descriptivo Acelerador de blanqueamiento y nombre técnico Maquinas dentales, de acuerdo a lo solicitado por Acryl-ar S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 24 y 11 a 23 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de usos autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM 1042-53, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **6823**

Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-6808-12-7

DISPOSICIÓN Nº

jmb

**6823**

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud  
**Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos**  
A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO  
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº ...**6.8...2...3**.....

Nombre descriptivo: Acelerador de blanqueamiento.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 11-156 - Maquinas dentales.

Marca de (los) producto(s) médico(s): BEYOND.

Clase de Riesgo: I

Indicación/es autorizada/s: para realizar tratamiento dentales estéticos que reducen varios tonos de color original de las piezas dentales.

Modelo/s: Acelerador blanqueador WhiteSpa Select.

Período de vida útil: diez (10) años

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: 1. Beyond Dental & Health Inc., 2. Beyond Technology Corp. Nanchang.

Lugar/es de elaboración: 1.12503 Exchange Dr. Suite 558, Stafford, TX 77477, USA, 2. Gao Xin Avenue No. 818, Nanchang, China, 330096.

Expediente Nº 1-47-6808-12-7

DISPOSICIÓN Nº

jmb

**6 8 2 3**

Dr. OTTO A. ORSINGHER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del  
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

.....6823.....

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



6823



Av. Elcano 4933 (C1427CIN)  
Buenos Aires - Argentina  
www.acryl-ar.com  
Tel./Fax: (011) 4553-4700  
ventas@acryl-ar.com

### INSTRUCCIONES DE USO

**1. Fabricado por:**

- Beyond Dental & Healt Inc. -12503 Exchange Dr. Suite 558 Stafford – TX 77477 – USA.
- BEYOND TECHNOLOGY CORP. – NANCHANG – Gao Xin Avenue Nº 818 – Nanchang – CHINA 330096.

**2. Importado por Acryl-ar SRL – Av. Elcano 4593 – Cap Fed.**

**3. Acelerador de blanqueamiento, Modelo: Acelerador WhiteSpa Select, Marca: BEYOND**

**4. Serie Nº:**

**5. Este equipo debe ser manejado cuidadosamente, aislado de vibraciones, fuera de la luz directa del sol, en lugares frescos, secos y ventilados.**

**6. Director técnico: Sandra Broz – farmacéutica – MN 10898**


**7. Autorizado por la ANMAT – PM – 1042-53.**

**8. Condición de venta:**

### Instalación

#### Paso 1

Seleccione el voltaje de energía en la base de la maquina. El voltaje

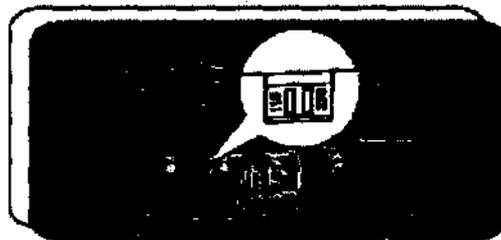

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

  
ACRYL-AR SRL  
SOLO GERENTE  
CHRISTIAN FLORES



Representante  
Exclusivo




6823

Av. Ezeano 4933 (C1427) (H)  
Buenos Aires - Argentina  
www.acryl-ar.com  
Tel./Fax: (011) 4553-4700  
ventas@acryl-ar.com




### Paso 2

Colocar el poste como se indica en la imagen. Inserte el perno de montaje a través de la base y apriete la tuerca mariposa. Conectar el cable como se muestra en la imagen. Girar el cuello estabilizador para elevar el cuello tan alto como sea posible. utilizar la barra de acero de apriete para apretar aún más el collar.

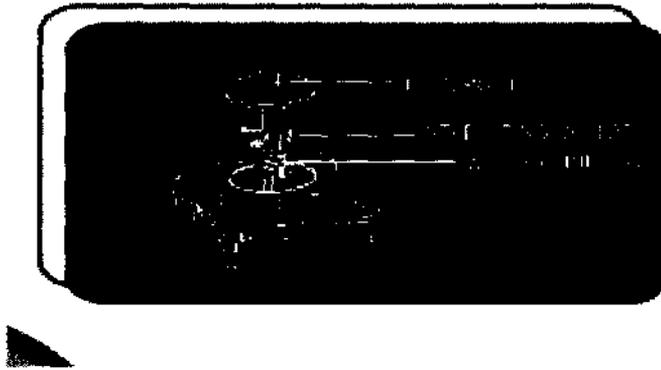

### Paso 3

Presione y empuje el poste dentro de la H hasta el tope del poste principal. Apriete con la mariposa como muestra la imagen a continuación.

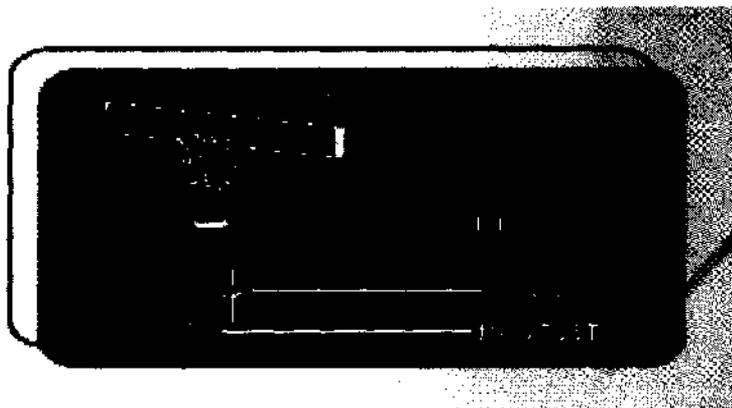

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

  
ACRYL-AR S.R.L.  
ROSA GERENTE  
CHRISTIAN BOCHENEG



Representante  
Exclusivo



8023



Av. Elcano 4933 (C1429) Q.E.U.  
Buenos Aires - Argentina  
www.acryl-ar.com  
Tel./Fax: (011) 4553-4700  
ventas@acryl-ar.com


**Paso 4**

Con un movimiento hacia la derecha girar el contrapeso hasta el final del poste.



**Paso 5**

Conectar la cabeza de la lámpara al final del poste H y apretar el tornillo con los elementos correspondientes. Conecte el conector de la fuente de poder. Remueva la protección que cubre la parte delantera de la cabeza de la lámpara.

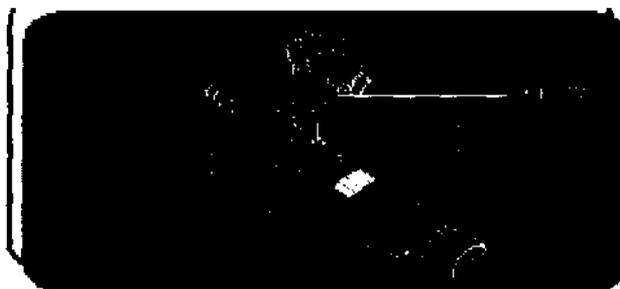

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TÉCNICA

  
ACRYL-AR S.R.L.  
SOCIO GERENTE  
CHRISTIAN POIRRENGO



Representante  
Exclusivo



6823

Av. Elcano 4933 (C1425AH)  
Buenos Aires - Argentina  
www.acryl-ar.com

Tel./Fax: (011) 4553-4700  
ventas@acryl-ar.com



**Paso 6**

Enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente. Encender el interruptor de alimentación principal como se muestra en la imagen.



Notas importantes de ensamble

1. Coloque el poste a través de la base y asegure con el tornillo de fijación.



  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA



  
ACRYL-AR S.R.L.  
SOCIO GERENTE  
CHRISTIAN BORCHENCO



6823



Av. Elcano 4933 (C1427CIN)  
Buenos Aires - Argentina  
www.acryl-ar.com  
Tel./Fax: (011) 4553-4700  
ventas@acryl-ar.com


- 2. Inserte el metal provisto para pararrayos en la agujero de la base y rótelo en sentido de las agujas del reloj. Remueva el metal cuando la base esta estabilizada.



- 3. Conecte la fuente de poder al cable conector.



- 4. Cierre el cobertor de la base. Usted ha instalado satisfactoriamente la base estabilizadora.

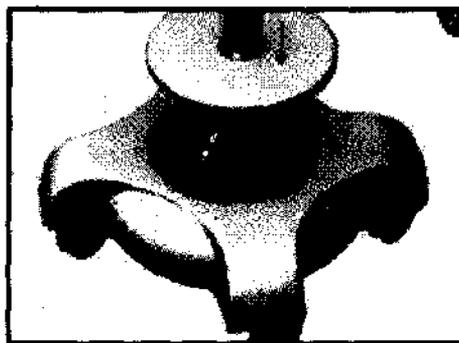

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

  
ACRYL-AR S.R.L.  
SOCIO GERENTE  
CHRISTIAN BROZ MENA

6823




**ACRYL-AR**

Representante  
Exclusiva



Av. Elcano 4933 (C. de UCH)  
Buenos Aires - Argentina  
www.acryl-ar.com  
Tel./Fax: (011) 4553-4700  
ventas@acryl-ar.com

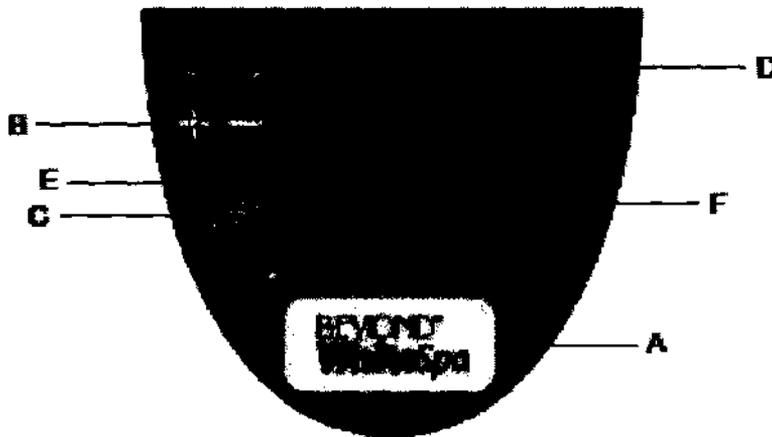

- A) Sensor de área activado: El sistema de activación por tarjeta para prender el acelerador. La luz blanca en la parte superior, sobre la punta izquierda superior el sensor se prendera por dos segundos y haciendo dos beeps (sonido) cuando la tarjeta haya sido leída. Tardara algunos minutos para cargar en la pantalla, el ciclo de tiempo para iniciar la cuenta regresiva.
- B) SET TIME +/-: Presione las teclas para ajustar el ciclo de tiempo de 1 minuto a 20 minutos. Configure el ciclo de acuerdo a estos términos de tiempo y presione START.
- C) START/PAUSE: Presione el botón de encendido del acelerador y la cuenta regresiva comenzara su ciclo. Presione de vuelta el botón para poner en pausa el tratamiento. En pausa, el tiempo y el tratamiento no serán perdidos sino momentáneamente congelados. Presionando nuevamente conseguimos el resumen del tratamiento.
- D) CANCEL: Presionando este botón conseguimos el paro parcial del ciclo de tratamiento.
- E) Remaining treatment time: Muestra el tiempo restante de tratamiento proveniente del sistema de tarjeta.

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

  
ACRYL-AR S.P.A.  
SOCIO GERENTE  
CHRISTIAN RODRIGUEZ





Representante  
Exclusivo



Av. Elcano 4933 (C1427CIH)  
Buenos Aires - Argentina  
www.acryl-ar.com  
Tel./Fax: (011) 4553-4700  
ventas@acryl-ar.com

F) Treatment Cycles Timer: Muestra los minutos del ciclo de tratamiento. El tiempo de fabrica es de 20 minutos pero esto puede ser seteado con la función SET TIME +/-.

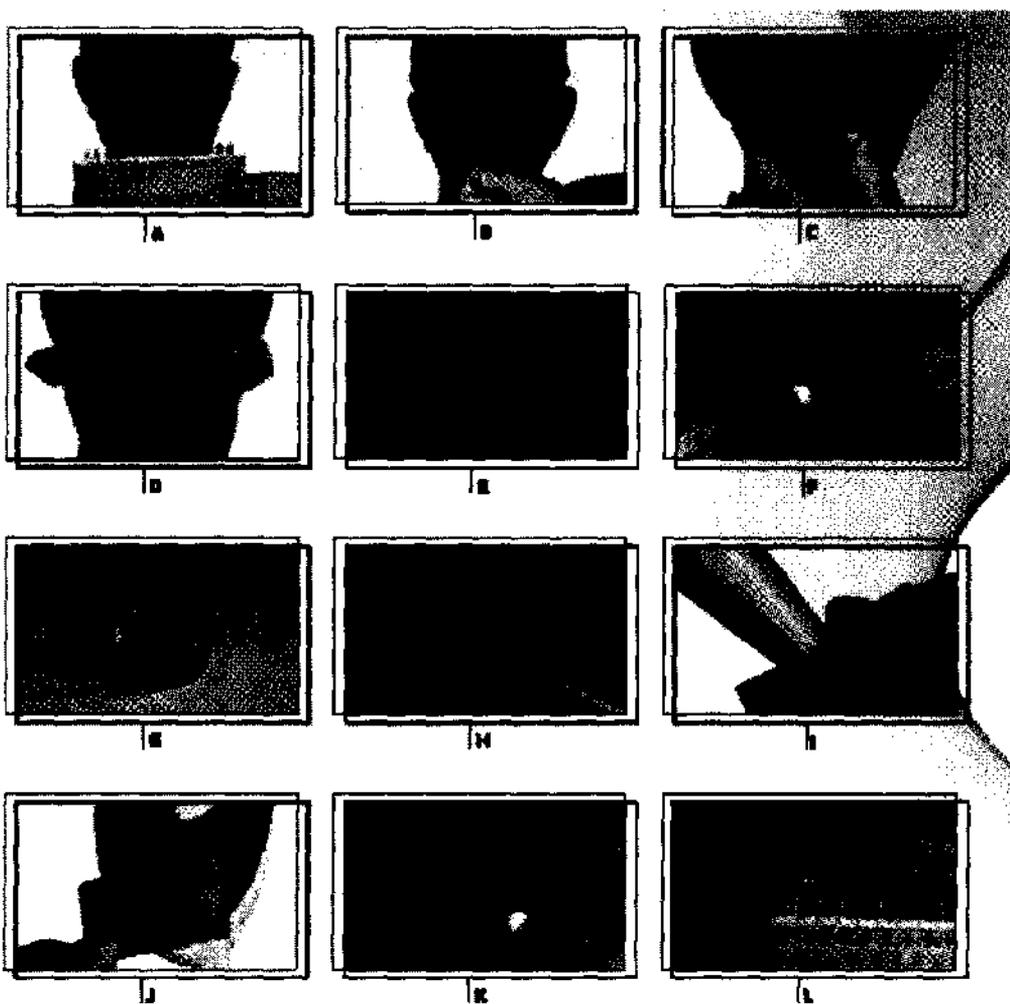

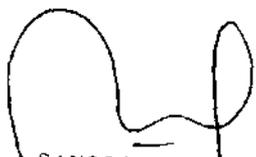  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

  
ACRYL-AR S.R.L.  
SOCIO GERENTE  
CHRISTIANA RODRIGUEZ



678 23



Av. Elcano 4933 (C1427) Ciudad  
Buenos Aires - Argentina  
www.acryl-ar.com  
Tel./Fax: (011) 4553-4700  
ventas@acryl-ar.com

## Instrucciones de uso

El estetista deberá primero cerciorarse de las necesidades del cliente, creando un blanqueamiento dental que se acomode mejor a cada cliente individualmente.

Antes de iniciar el proceso, tome nota del color de los dientes. Use la guía de tonalidades incluidas para mostrar al cliente el color actual de sus dientes. La tonalidad actual del cliente puede ser anotada en la parte trasera de la tarjeta como referencia postratamiento.

### A) PREPARACION

1. Coloque los lentes protectores sobre el paciente.
2. Aplique una capa generosa de crema de protección labial para sus labios usando un Hisopo.
3. Instruya al cliente cómo insertar el abre bocas BEYOND™ FlexiBlue dentro de la boca con el protector de lengua apuntando hacia adentro. Dígale al cliente que muerda suavemente sobre los brazos del abre bocas y descanse su lengua sobre el protector de lengua. Informe al cliente que es seguro tragar saliva durante el tratamiento.
4. Haga que el cliente posicione el protector facial sobre las áreas expuestas alrededor de su boca, y asegure la gasa sobre los lados de la boca con el abre bocas. Inserte rollos de algodón en cada uno de los lados del frenillo (dentro de las mejillas contra lo alto de los dientes).
5. Crema de protección de labio adicional puede ser aplicada para el interior de la superficie de las encías inferiores.
6. Pida al cliente que use bolas de algodón o gasa para secar la superficie de de sus dientes que serán blanqueados. NO aplique el gel de blanqueamiento a dientes húmedos ya que estos inhibirán el proceso de blanqueamiento.



SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TÉCNICA



ACRYL-AR S.R.L.  
SOCIO GERENTE  
CHRISTIAN PROVENZA



8822



Av. Elcano 4933 (C1427)  
Buenos Aires - Argentina  
www.acryl-ar.com  
Tel./Fax: (011) 4553-4700  
ventas@acryl-ar.com

**B) APLICACIÓN DEL GEL**

1. Asegúrese que todos los dientes que serán blanqueados están secos y que la crema de protección labial está aplicada sobre los labios y sobre la superficie interna de la encía inferior.
2. Abra la envoltura del Gel de Blanqueamiento BEYOND™ WhiteSpa Select y adhiera la punta de mezda a la punta de mezcla del Gel de Blanqueamiento de doble barril colocando una dosis simple del gel en la bandeja de preparación.
3. Instruya al cliente a que use el cepillo de aplicación, aplique una lámina de 2mm del gel blanqueador a los dientes que serán blanqueados. Dependiendo de la sonrisa del cliente esta podrá incluir un total de 16 o más dientes.

**C) ACTIVACION DE LA LUZ**

1. Pida al cliente para que se recueste en la silla dental. Posicione el Acelerador de Blanqueamiento BEYOND™ WhiteSpa Select lo más cerca posible del abrebocas, asegurando que la luz forme un ángulo de 90 grados con la superficie a blanquear.
2. Presione el interruptor a encendido encontrado en lo más bajo de la base acelerador para encender el artefacto. El panel de control LCD se encenderá y SE HABILITARÁ CON LA TARJETA se encenderá a través de lo alto de la pantalla azul. Mantenga los 60 minutos, Sistema de Activación de la Tarjeta sobre la activación del área del sensor. Una luz blanca debajo del área del sensor se encenderá por dos segundos y el instrumento sonará 2 veces, señalando que los minutos han sido activados. Un total de 60 minutos aparecerán sobre la mano izquierda de la pantalla, con el más largo tiempo mostrando el ajuste por defecto de 20 minutos apareciendo en el centro de la pantalla.

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

  
ACRYL-AR  
SOCIO GERENTE  
CHRISTIAN BORMENGO

**ACRYL-AR**

Representante  
Exclusivo



6823



Av. Elcano 4933 (C1427)  
Buenos Aires - Argentina  
www.acryl-ar.com  
Tel./Fax: (011) 4553-4700  
ventas@acryl-ar.com

3. Ajuste los tiempos de intervalo al tiempo de tratamiento deseado (el ajuste de fábrica es de 20 minutos) usando los botones de ajuste de tiempo +/- . Una vez que el tiempo deseado es seleccionado, presione el botón de inicio para empezar el primer ciclo de tratamiento.
4. Usted puede proveer al cliente música o videos para que se entretenga durante el tiempo de tratamiento, permitiendo al cliente disfrutar de un procedimiento de blanqueamiento relajado.
5. Después de que el ciclo de tratamiento es finalizado, el acelerador de blanqueamiento hará un sonido agudo dos veces y la luz se apagará automáticamente. Los minutos de tratamiento usados serán restados del tiempo total de tratamiento restante. Si hay minutos de tratamiento restantes, el sistema cambiará al tiempo original de tratamiento hacia el inicio de la sesión de tratamiento. Si los minutos expiraron, el sistema regresará a la pantalla HABILITAR CON LA TARJETA.
6. Remueva la cabeza de la lámpara y haga que el cliente se remueva el gel de blanqueamiento de la superficie de sus dientes usando hisopos. NO enjuague los dientes con agua.
7. Aplique más gel de blanqueamiento en la tapa de mezcla y repita para un total de tres ciclos de 20 minutos; cada vez removiendo y re-aplicando gel de blanqueamiento fresco a los dientes entre los ciclos. Después del ciclo final de tratamiento, retire la lámpara y remueva el gel de blanqueamiento de los dientes del cliente. Pídale que se retire el abrebocas y las gafas protectoras y que se enjuague bien la boca.

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

  
ACRYL-AR S.R.L.  
SOCIO GERENTE  
CHRISTIAN BURCHENRO

### Solución de problemas

En caso de que el equipo no encienda:

- Verifique que el voltaje sea el adecuado para su región
- Verifique que el cable alimentador de corriente esté firmemente enchufado en el equipo
- Verifique que la ficha ON/OFF en la base del equipo esté encendida
- En caso de que el equipo no encienda con las indicaciones anteriores, reemplace los fusibles en la base con los fusibles extras suministrados


En caso de que el control remoto no encienda:

- Verifique de que el dispositivo esté encendido
- Verifique que el control apunte directamente al área del sensor y que no haya obstrucciones en el medio
- Reemplace la batería

El equipo emite una señal sonora luego de haber sido apagado:

- Asegúrese que el equipo no se ha sobrecalentado; mire el indicador en el panel y si este está flasheando es por que el sobrecalentamiento ha ocurrido
- Contacte al servicio técnico autorizado.

### Reemplazando el bulbo de luz

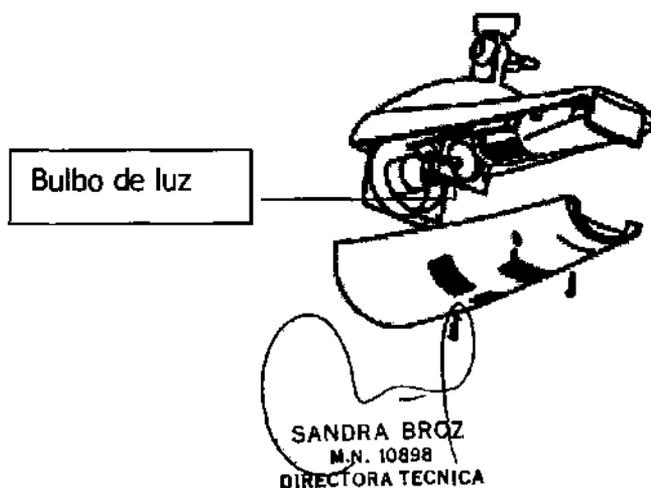



010 010 010




Av. Elcano 4933 (C1420) C.F.H.  
Buenos. Aires - Argentina  
www.acryl-ar.com  
Tel./Fax: (011) 4553-4700  
ventas@acryl-ar.com

### Mantenimiento

Luego de cada tratamiento limpie la lámpara y la ventanilla que la cubre con spray desinfectante y un paño seco y limpio. Este equipo no debe ser esterilizado.

Luego de su uso, no desenchufe el equipo hasta tanto el indicador de enfriamiento se apague.

### Posición de almacenaje

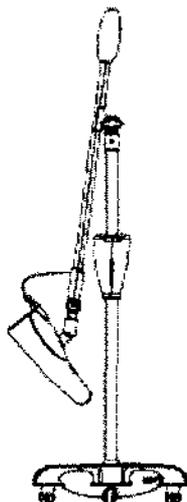

### Contraindicaciones

- Este equipo no debe ser utilizado con personas que sean alérgicas o sean sensibles a resinas.
- En caso de que el paciente presente sensibilidad en los dientes durante el tratamiento termine el mismo inmediatamente y retire el gel antes de tratar con fluoruro.
- Este equipo no debe ser utilizado con mujeres embarazadas o niños menores de 16 años.

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TÉCNICA



ACRYL-AR S.R.L.  
  
SOCIO GERENTE  
CHRISTIAN HOCHENEDL



Representante  
Exclusiva



6823



Av. Elcano 4933 (C1427CIN)  
Buenos Aires - Argentina  
www.acryl-ar.com  
Tel./Fax: (011) 4553-4700  
ventas@acryl-ar.com

Transporte y almacenamiento:

Evite arrojar el producto o golpearlo contra superficies duras.

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura de almacenamiento - 20° + 55°.
- Humedad relativa <93%.
- Presión Atmosférica 50 kPA – 106 kPA.

Formas de presentación

1 Unidad.

Vida útil

10 años



SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA



ACRYL-AR S.R.L.  
SOCIO GERENTE  
CHRISTIAN BROZ



6823



Av. Elcano 4933 (C1427CII)  
Buenos Aires - Argentina  
www.acryl-ar.com  
Tel./Fax: (011) 4553-4700  
ventas@acryl-ar.com

## PROYECTO DE ROTULO

1. Fabricado por:

- Beyond Dental & Healt Inc. -12503 Exchange Dr. Suite 558 Stafford – TX 77477 – USA.
- BEYOND TECHNOLOGY CORP. – NANCHANG – Gao Xin Avenue N° 818 – Nanchang – CHINA 330096.

2. Importado por Acryl-ar SRL – Av. Elcano 4593 – Cap Fed.

3. Acelerador de blanqueamiento, Modelo: Acelerador WhiteSpa Select, Marca: BEYOND

4. Serie N°:

5. Este equipo debe ser manejado cuidadosamente, aislado de vibraciones, fuera de la luz directa del sol, en lugares frescos, secos y ventilados.

6. Ver instrucciones de uso en el manual del usuario.

7. Ver precauciones, advertencias y contraindicaciones en instrucciones de uso.

8. Director técnico: Sandra Broz – farmacéutica – MN 10898

9. Autorizado por la ANMAT – PM – 1042-53.

10. Condición de venta:



SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA



ACRYL-AR SRL  
SOCIO GERENTE  
CHRISTIAN BOCHENKO



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

ANEXO III  
CERTIFICADO

Expediente Nº 1-47-6808-12-7

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº .....**6823**....., y de acuerdo a lo solicitado por Acryl-ar S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Acelerador de blanqueamiento.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 11-156 Maquinas dentales.

Marca de (los) producto(s) médico(s): BEYOND.

Clase de Riesgo: I

Indicación/es autorizada/s: para realizar tratamiento dentales estéticos que reducen varios tonos de color original de las piezas dentales.

Modelo/s: acelerador blanqueador WhiteSpa Select.

Período de vida útil: 10 (diez) años.

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: 1. Beyond Dental & Health Inc., 2. Beyond Technology Corp. Nanchang.

Lugar/es de elaboración: 1. 12503 Exchange Dr. Suite 558, Stafford, TX 77477, USA, 2. Gao Xin Avenue No. 818, Nanchang, China, 330096.

Se extiende a Acryl-ar S.R.L. el Certificado PM-1042-53 en la Ciudad de Buenos Aires, a **20 NOV 2012**, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

Expediente Nº 1-47-6808-12-7

DISPOSICIÓN Nº

jmb

**6823**

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.