



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-004776-22-5

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-004776-22-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I. solicita autorización para la venta de Productos para diagnóstico in vitro denominado: Ventana.

Que en el expediente de referencia consta el informe técnico producido por el Servicio de Productos para Diagnóstico que establece que los productos reúnen las condiciones de aptitud requeridas para su autorización .

Que se ha dado cumplimiento a los términos que establecen la Ley N° 16.463, Resolución Ministerial N° 145/98 y Disposición ANMAT N° 2674/99.

Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico para diagnóstico de uso in vitro Ventana de acuerdo con lo solicitado por PRODUCTOS

ROCHE S.A.Q. e I. con los Datos Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2022-103023512-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 740-823 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

Marca comercial: Ventana

Indicación/es de uso:

1-2) El uPath enterprise software (o NAVIFY Digital Pathology) está destinado a la interacción de los usuarios con imágenes digitalizadas de portaobjetos de vidrio a través de las siguientes funcionalidades:

- a. Visualización, gestión e intercambio de imágenes digitalizadas de portaobjetos de vidrio.
- b. Importación de información del Sistema de información de laboratorio (LIS).
- c. Exportación de información al LIS.
- d. Uso como plataforma de algoritmos de análisis de imágenes.

Modelos:

- 1) NAVIFY Digital Pathology (uPath cloud) - Catálogo N° 09453733001
- 2) uPath - Catálogo N° 09453628001)

Forma de presentación: No aplica.

Período de vida útil y condición de conservación: No aplica.

Nombre del fabricante:

Ventana Medical Systems, Inc.

Lugar de elaboración:

Ventana Medical Systems, Inc. 1910 East Innovation Park Drive. Tucson, Arizona 85755. (USA).

Condición de uso: Uso profesional exclusivo

Expediente N° 1-0047-3110-004776-22-5

N° Identificadorio Trámite: 40716

AM

Digitally signed by GARAY Valéria Teresa
Date: 2022.11.11 16:32:13 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.11.11 16:32:22 -03:00


Roche uPath enterprise software

Guía del usuario

1019966ES versión 2.0

Versión de software 2.0

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A.Q. e.l.
DIVISION Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

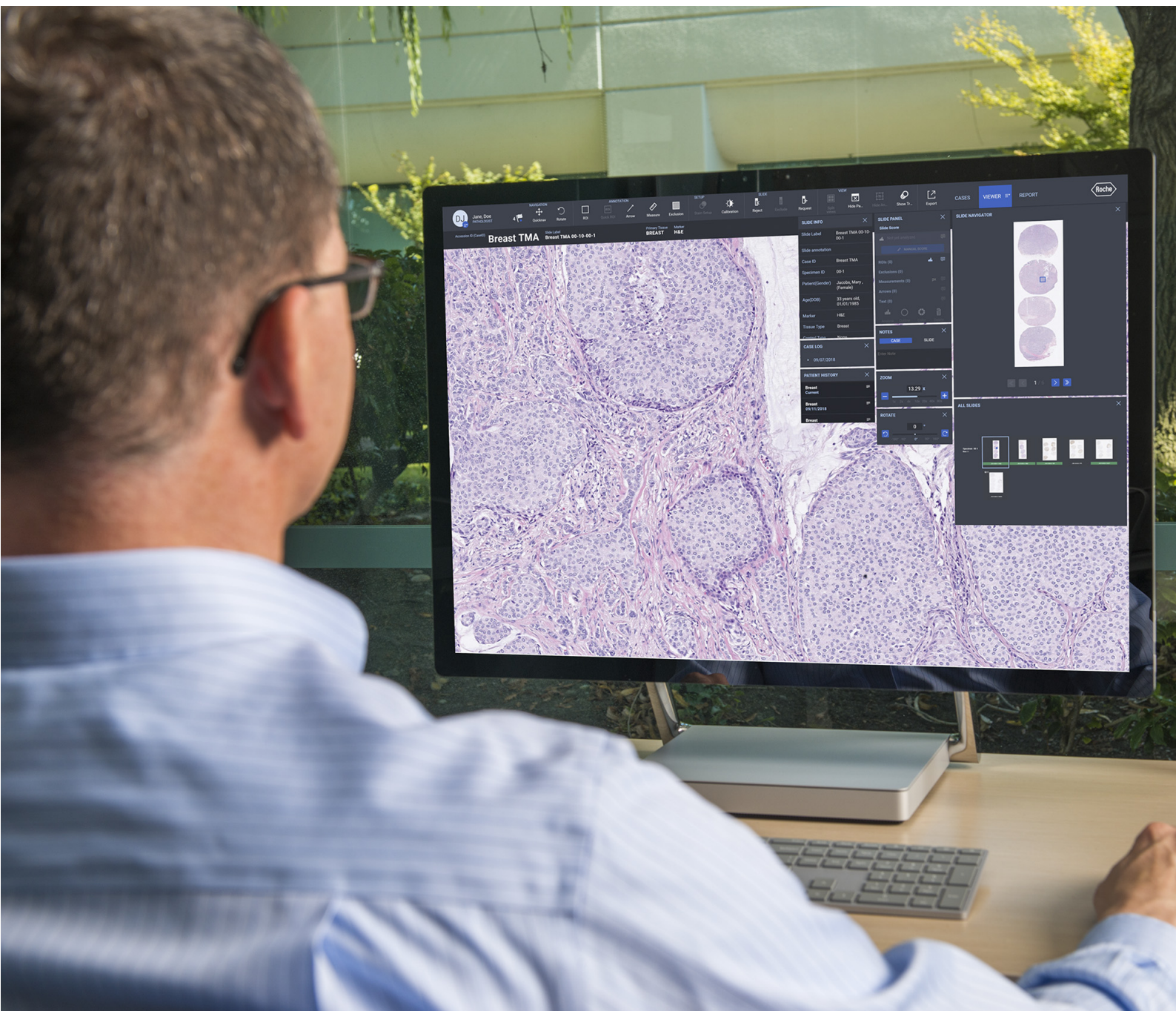

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
División Diagnóstico
DT & APODERADA LEGAL

Información sobre la publicación

Versión de la publicación	Versión de software	Fecha de revisión	Descripción del cambio
1.0	2.0	Julio de 2021	Versión inicial
2.0	2.0	Enero de 2022	Se ha actualizado el etiquetado del producto del manual del usuario de conformidad con IVDR.

☰ Historial de versiones

Nota de la edición

Esta publicación está destinada a los usuarios de Roche uPath enterprise software.

Se han realizado todos los esfuerzos necesarios para asegurar que toda la información contenida en esta publicación es correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede que el fabricante de este producto tenga que actualizar la información contenida aquí como resultado de las actividades de vigilancia del producto, lo que dará lugar a una nueva versión de la publicación.

Dónde encontrar información

La **Asistencia al usuario** contiene toda la información acerca del producto, que comprende los siguientes aspectos:

- Uso rutinario
- Mantenimiento
- Seguridad
- Información sobre configuración
- Información contextual


La **Guía del usuario** se centra en el funcionamiento y el mantenimiento rutinarios. El contenido se organiza en función del flujo de trabajo de funcionamiento normal.

⚠ Notificación de incidentes

- ▶ Informe a su representante del servicio técnico de Roche y a su autoridad competente local acerca de cualquier incidente grave que se pueda producir al utilizar este producto.

Formación

No lleve a cabo operaciones de funcionamiento ni tareas de mantenimiento a menos que haya recibido la debida formación por parte de Roche Diagnostics. Deje las tareas que no se describen en la documentación del usuario en manos de la asistencia técnica de Roche con formación.

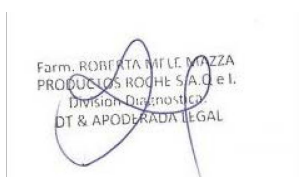

Imágenes

Las imágenes que se recogen en esta publicación se han incorporado únicamente a efectos ilustrativos. Los datos que pueden configurarse y modificarse en las capturas de pantalla, como las pruebas, los resultados o los nombres de rutas que se muestran en ellas, no deben utilizarse para propósitos de laboratorio.

Garantía

Cualquier modificación que el cliente realice en el sistema anulará e invalidará la garantía o el contrato de servicio.

Para conocer las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su representante de ventas local o consulte a su socio del contrato de garantía.

Encargue siempre las actualizaciones de software a un representante de servicio al cliente de Roche, o bien realice dichas actualizaciones con su ayuda.

Copyright

© 2020-2022, Ventana Medical Systems, Inc. Reservados todos los derechos.

Información sobre la licencia

Roche uPath enterprise software está protegido por la legislación contractual, así como por las leyes de derechos de autor y los tratados internacionales. Roche uPath enterprise software contiene una licencia de usuario, lo que significa que solo los usuarios autorizados pueden acceder al software y utilizarlo. El uso y la distribución no autorizados pueden dar lugar a sanciones civiles y penales.

Software comercial y de código abierto

Roche uPath enterprise software puede contener componentes o módulos de software comercial o de código abierto. Para obtener información más detallada sobre la propiedad intelectual y otras advertencias, así como acerca de las licencias de los programas de software que se encuentran en Roche uPath enterprise software, consulte la documentación de distribución electrónica que se suministra con este producto.

El software comercial y de código abierto y Roche uPath enterprise software en conjunto pueden constituir un dispositivo regulado según la legislación aplicable. Para obtener información más detallada, consulte la documentación del usuario y el etiquetado correspondientes.

Tenga en cuenta que la autorización correspondiente dejará de ser válida, según la legislación pertinente, si se llevan a cabo modificaciones en uPath enterprise software que no se hayan autorizado previamente.

Marcas comerciales

Se reconocen las siguientes marcas comerciales:

VENTANA y UPATH son marcas comerciales de Roche.

El resto de nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCOS ROCHE S.A. S.r.l.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Comentarios

Se han realizado todos los esfuerzos necesarios para asegurar que esta publicación cumpla con el uso previsto. No obstante, estaremos encantados de recibir comentarios sobre cualquier aspecto de esta publicación y los tendremos en cuenta en las actualizaciones futuras. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la asistencia de Roche.

Homologaciones

Roche uPath enterprise software cumple los requisitos estipulados en las siguientes normas:

Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios para diagnóstico *in vitro* y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión.




Para uso diagnóstico *in vitro*.



De conformidad con las disposiciones de las normativas aplicables de la UE.

Direcciones de contacto

Ventana Medical Systems, Inc.
1910 E. Innovation Park Drive
Tucson, Arizona 85755
EE. UU.

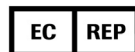

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Alemania

**Filiales de Roche**

Puede consultar una lista de todos los afiliados de Roche en:

https://www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm

Farm. ROBERTA NELLE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. O e I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

eLabDoc

Es posible descargar la documentación de usuario electrónico mediante el servicio electrónico eLabDoc de Roche DiaLog:

<https://www.dialog.roche.com>

Para obtener más información al respecto, póngase en contacto con la filial local o con la asistencia técnica de Roche.



Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCTOS ROCHE S.A.C.e.L.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL



Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCTOS ROCHE S.A.C.e.L.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Índice

Información sobre la publicación	3
Direcciones de contacto	5
Índice	7
Uso previsto	9
Símbolos y abreviaturas	9
Novedades de la versión 2.0 de la publicación	12

Seguridad

1 Información general de seguridad	
Introducción	19
Clasificaciones de seguridad	20
Mensajes de precaución	21
Software y seguridad de datos	22

Descripción general del software

2 Descripción general del software	
Navegación por uPath software	29
Descripción general de la Asistencia al usuario	34
Filtrado y búsqueda de información	37
Configuración de las preferencias del usuario	42
Apertura y visualización de los paneles en la lista CASES	50

Visualización de casos y análisis de portaobjetos

3 Gestión de casos e imágenes de portaobjetos	
Administración de casos	67
Visualización y análisis de portaobjetos	78
Consultas en los casos	136
Producción y cierre de un informe	145
Descripción general de las pantallas casos e imagen para los patólogos	161

Coordinación de casos

4 Realización de la coordinación de casos	
Descripción general de las pantallas CASES y VIEWER	189
Seguimiento del avance del caso	193
Visualización de la lista ALL ACTIVE CASES	194
Identificación de casos que requieren un patólogo	195
Identificación de un caso que requiera portaobjetos	196
Examinación de los parámetros de asignación de casos	197
Asignación o reasignación de un caso a un patólogo	198
Asignación del estado URGENT a un caso	200

Ajustes de administrador

5 Configuración general	
Configuración del monitor	207
Configuración general del software	208
Configuración del panel del visor	214
Configuración de informe	215
Configuración del catálogo de algoritmos	234
Gestión de algoritmos	238
Seguimiento del software e informes de auditoría	245
Gestión de la cola de tareas de la imagen	254
Configuración de la tinción	260
Configuración de las reglas de administración	263
Configuración de comentarios predefinidos	284
Mostrar información de la licencia	288

Gestión de datos

6 Gestión de datos para los administradores y los histotécnicos	
Resumen de la gestión de datos	293
Tareas de gestión de datos compartidas para los casos	300
Tareas del administrador en la gestión de datos	319
Tareas del histotécnico en la gestión de datos	334

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCI. LOS ROCHE S.A. e I.
 División Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Farm. ROBERTA MILLE MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Uso previsto

uPath enterprise software de Roche se ha diseñado para permitir a los usuarios interactuar con las imágenes digitalizadas de portaobjetos de vidrio gracias a las siguientes funciones:

1. Visualización, gestión e intercambio de las imágenes digitalizadas de portaobjetos de vidrio.
2. Importación de información del Sistema de información de laboratorio (LIS).
3. Exportación de información al LIS.
4. Uso como plataforma para los algoritmos de análisis de imágenes.

Símbolos y abreviaturas

Nombres de productos

Salvo si el contexto indica claramente un significado distinto, se utilizan los siguientes nombres de productos y descriptores.


Nombre del producto	Descriptor
Roche uPath enterprise software	software
uPath enterprise software uPath Software	abreviatura del nombre del software que se utiliza en este documento
uPath	abreviatura del nombre del software que se utiliza en la versión local
NAVIFY Digital Pathology	nombre de la marca de la versión del software basada en la nube

☰ Nombres de productos


Símbolos utilizados en esta publicación

Símbolo	Explicación
•	Elemento de la lista
☰	Temas relacionados que contienen más información
💡	Sugerencia. Información adicional sobre el uso correcto o consejos útiles.
▶	Inicio de una tarea
❗	Información adicional contenida en una tarea
➔	Resultado de una acción dentro de una tarea.
📅	Frecuencia de una tarea.
🕒	Duración de una tarea.
📁	Materiales que se necesitan para una tarea.
📋	Requisitos previos de una tarea.

☰ Símbolos utilizados en esta publicación

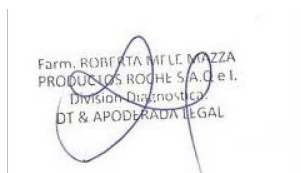

Símbolos utilizados en el producto

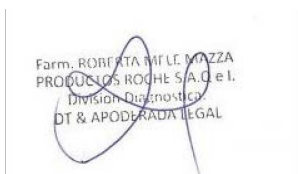

Símbolo	Explicación
	Tema. Se utiliza en referencias cruzadas a temas.
	Tarea. Se utiliza en referencias cruzadas a tareas.
	Figura. Se utiliza en títulos de figuras y en referencias cruzadas a figuras.
	Tabla. Se utiliza en títulos de tablas y en referencias cruzadas a tablas.
	Símbolos utilizados en esta publicación

Símbolo	Explicación
	Número mundial de artículo comercial.
	Fecha de fabricación.
	Fabricante.
	Representante autorizado en la Comunidad Europea.
	Para uso diagnóstico in vitro
	Marca de conformidad europea del producto.
	Indica la entidad que se encarga de importar el producto sanitario en la Unión Europea.
	Consulte la documentación del usuario.
	Precauciones generales.
	Número de referencia (código de producto del fabricante).
	Identificador único de dispositivo
	Símbolos utilizados en el producto

Abreviaturas

En este documento se utilizan las siguientes abreviaturas.

Abreviatura	Definición
CE	Comunidad Europea
EN	Norma Europea
FOV	Campo de visión
IMS	Sistema de gestión de imágenes
LIS	Sistema de información de laboratorio
IVD	Diagnóstico in vitro
IVDR	Reglamento sobre diagnóstico in vitro.
PHI	Información sobre la salud del paciente
ROI	Región de interés
RUO	Para uso exclusivo en investigación. No está indicado para utilizarse en procedimientos de diagnóstico.

☒ Abreviaturas

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

Novedades de la versión 2.0 de la publicación

En esta sección se describen las nuevas funciones y las características mejoradas de Roche uPath enterprise software, Versión de software 2.0.

Funciones nuevas

Se han incorporado nuevas funciones y características mejoradas para el usuario.

- Asistencia al usuario en cuanto a la navegación, ayuda en línea de uPath software.
- Restablecimiento de contraseña en la versión local de uPath enterprise software.
- Consulta del estado del portaobjetos con códigos de color actualizados y marcado de etiquetas de imagen de portaobjetos.
- Mejoras en cuanto a la región de interés (ROI), como la medición predeterminada en micrómetros, la capacidad de deshacer la acción más reciente, la incorporación de ROI y de los análisis asociados a los informes.
- Personalización de los paneles del visor que se muestran automáticamente cuando se consultan y se analizan los casos.
- Optimización del rendimiento mediante el almacenamiento en la memoria caché de las imágenes de portaobjetos visualizadas.
- Desidentificación e identificación de la información sobre la salud del paciente.
- Cambio del rechazo del portaobjetos por la repetición del escaneado y el funcionamiento de la exclusión de portaobjetos.
- Uso de mapas térmicos con algoritmos (disponible en una selección de algoritmos) en el panel **SLIDE NAVIGATOR**.
- Gestión de tipos de tejido.
- Uso de VENTANA Connect para la gestión de información sobre casos, muestras y portaobjetos de los sistemas de información de laboratorio.
- Establecimiento de los valores predeterminados del software en la configuración de paneles.
- Seguimiento y supervisión del uso del usuario con detalles ampliados de la licencia, como los usuarios simultáneos, el uso de algoritmos, notificaciones de nivel bajo o agotamiento de las licencias de algoritmos y el estado normativo de los algoritmos con licencia.



Temas nuevos


Los temas nuevos que aparecen en esta guía:

- Descripción general de la Asistencia al usuario (34)
- Para restablecer la contraseña en uPath (44)
- Configuración de los paneles del visor (46)
- Configuración del almacenamiento en la memoria caché del cliente (47)
- Desidentificación e identificación de pacientes (70)
- Solicitud de volver a escanear un portaobjetos (85)
- Acerca de la repetición del escaneado de un portaobjetos (87)
- Repetición del escaneado de un portaobjetos (89)
- Exclusión de un portaobjetos (90)
- Añadir una medición a una región de interés o tejido (108)
- Aumento de imágenes del portaobjetos (118)
- Acerca de la visualización de las imágenes del portaobjetos y de la información del paciente (164)
- Etiquetado del estado del portaobjetos (167)
- Uso de mapas térmicos (173)
- Panel miniatura (179)
- Configuración del Software VENTANA Connect (211)
- Notificaciones sobre el estado de la licencia del algoritmo (182)
- Configuración del panel del visor (214)
- Configuración de las reglas de administración (263)
- Acerca de la conservación de las imágenes (183)
- Conservación de las imágenes (160)
- Gestión de tipos de tejido (265)

Asistencia al usuario

La guía del usuario de uPath enterprise software se encuentra disponible en documento PDF (Portable Document Format) y como sistema de ayuda interactiva (Asistencia al usuario). La Asistencia al usuario puede contener funciones exclusivas que no figuran en el PDF. Esta función incorpora vídeos.

- Descripción general de la Asistencia al usuario (34)

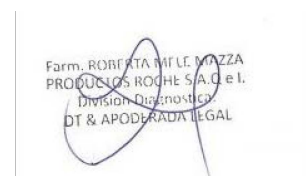

Cambios normativos

Se han actualizado las siguientes secciones de la Guía de usuario de Roche uPath enterprise software, versión 1.0, versión de software 2.0, en cuanto al etiquetado IVDR:

- Se ha actualizado la sección Dónde encontrar información.
 - Se ha añadido una advertencia sobre la Notificación de incidentes.
 - Se ha actualizado la sección Formación.
 - Se ha actualizado la sección Imágenes.
 - Se ha actualizado el intervalo de fechas de los derechos de autor.
 - Se ha actualizado la sección Información sobre la licencia.
 - Se ha añadido la sección Software comercial y de código abierto.
 - Se ha actualizado la sección Aprobaciones.
 - Se ha actualizado la sección Direcciones de contacto.
 - Se ha actualizado la tabla Símbolos que se utilizan en el producto.
 - Se ha actualizado la tabla Abreviaturas.
- ☒ Información sobre la publicación (3)
 - ☒ Direcciones de contacto (5)
 - ☒ Uso previsto (9)
 - ☒ Símbolos y abreviaturas (9)

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

Seguridad

1	Información general de seguridad	17
---	--	----

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A.C e.l.
Division Diagnostico
DT & APODERADA LEGAL

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Información general de seguridad

Contenidos del capítulo

1

Introducción	19
Clasificaciones de seguridad	20
Mensajes de precaución	21
Cansancio debido a un uso prolongado	21
Software y seguridad de datos	22

Farm. ROBERTA M.L. MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostico
DT & APODERADA LEGAL


Introducción

Atención general

Lea la información de seguridad a fondo antes de usar el software.

- ▶ Preste especial atención a todas las precauciones de seguridad.
- ▶ Siga siempre las instrucciones incluidas en esta publicación.
- ▶ No utilice el software de una manera distinta de la descrita en esta publicación.

Deben cumplirse todas las regulaciones, los códigos locales y las instrucciones relacionadas con la seguridad que aparecen en este documento.

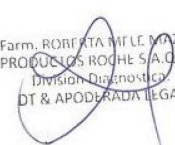

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A.C e.l.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Clasificaciones de seguridad

Las precauciones de seguridad y las notas importantes para el usuario se clasifican conforme a la normativa vigente. Familiarícese con los siguientes significados e iconos:

Alerta de seguridad

- ▶ El símbolo de alerta de seguridad se utiliza para avisarle de posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que vayan acompañados de este símbolo para evitar posibles daños en el sistema, lesiones o la muerte.

Los símbolos y las palabras claves siguientes se utilizan para riesgos concretos:

ADVERTENCIA

Advertencia...

- ▶ ...indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Precaución...

- ▶ ...indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría causar lesiones leves o moderadas.

AVISO


Aviso...

- ▶ ...indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría causar daños al instrumento.

La información importante que no afecta a la seguridad se indica con el siguiente icono:

Sugerencia...

...contiene información adicional sobre el uso correcto o consejos útiles.

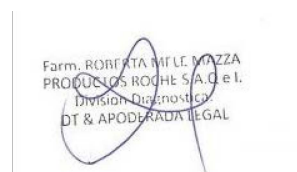

Mensajes de precaución

Lista de mensajes de precaución

- ▶ Antes de empezar a utilizar el instrumento, lea atentamente los mensajes de precaución. Si no los cumple, pueden producirse lesiones leves o moderadas.

Contenidos de esta sección


Cansancio debido a un uso prolongado (21)

Cansancio debido a un uso prolongado

Cansancio debido a un uso prolongado

Mirar al monitor durante varias horas puede provocar fatiga en los ojos y cansancio físico.

- ▶ Tómese un descanso para relajarse, siguiendo las normativas locales que correspondan.

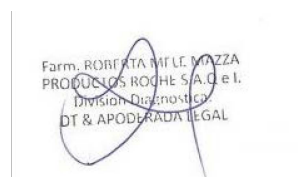

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Software y seguridad de datos

Acceso no autorizado al sistema y pérdida de datos

Los dispositivos de almacenamiento externos pueden introducir software malicioso en el ordenador, que se pueden utilizar para obtener un acceso no autorizado a los datos o provocar modificaciones no deseadas en el software.

Es posible que el sistema no se encuentre protegido frente a software maliciosos y ataques de piratas informáticos.

Los usuarios deben responsabilizarse de la seguridad de la infraestructura de TI y de la protección frente a los software maliciosos o los ataques de piratas informáticos. No tomar medidas al respecto puede provocar una pérdida de los datos o dejar el sistema inservible.

Roche recomienda que se tomen las siguientes precauciones:

- ▶ Permitir la conexión únicamente a dispositivos externos autorizados.
- ▶ Proteger todos los dispositivos externos, garantizando el uso del software de seguridad adecuado.
- ▶ Proteger el acceso a todos los dispositivos externos, garantizando el uso del equipo de seguridad adecuado. La asistencia técnica de Roche puede recomendarle un firewall adecuado.
- ▶ No copie ni instale ningún tipo de software en el sistema a menos que forme parte de este o que la asistencia técnica de Roche así se lo haya indicado.
- ▶ Si es necesario un software adicional, póngase en contacto con la asistencia técnica de Roche para garantizar que se valida el software correspondiente.
- ▶ No conecte ningún otro dispositivo de almacenamiento a los puertos USB a menos que la asistencia técnica de Roche o una de las instrucciones de funcionamiento así se lo indique.
- ▶ Extreme las precauciones al utilizar los dispositivos de almacenamiento externo, como las unidades USB, los DC o los DVD. No conecte al sistema ningún otro dispositivo de almacenamiento externo que haya utilizado en ordenadores públicos o domésticos.
- ▶ Conserve todos los dispositivos de almacenamiento externo en un lugar seguro y asegúrese de que solo tiene acceso a él el personal autorizado.
- ▶ Haga una copia de seguridad de los datos periódicamente.
- ▶ Los clientes son responsables de la seguridad de su red de área local, sobre todo a la hora de protegerla frente a software y ataques malintencionados. Esta protección puede incluir medidas como un firewall, que sirve para separar el dispositivo de redes no controladas. Por otro lado, la protección también puede comprender medidas que garanticen que la red conectada está libre de códigos malintencionados.

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

Datos dañados por la divulgación de una contraseña

La seguridad del sistema y de sus datos depende del acceso protegido por contraseña. Si una persona no autorizada descubre su ID de usuario y contraseña, pueden poner en peligro la seguridad.

- ▶ Introduzca siempre la contraseña cuando nadie la pueda ver.
- ▶ No escriba nunca la contraseña, ni en formularios de contacto, ni en agendas ni en ningún archivo del ordenador.
- ▶ No comparta su contraseña con nadie. Roche nunca le pedirá la contraseña.
- ▶ Si en algún momento revela su contraseña, cámbiela de inmediato.
- ▶ Póngase en contacto con su filial de Roche si sospecha que su cuenta puede estar en peligro.

Software de terceros no homologado

La instalación de cualquier software de terceros en uPath software que no haya homologado Roche Diagnostics puede provocar un funcionamiento incorrecto del sistema.

- ▶ Instale únicamente software de terceros homologado.

Validación poco fiable debido a cambios no autorizados de los ajustes de validación


El fabricante no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de modificaciones posteriores no autorizadas de los ajustes de validación aceptados e incluidos en el sistema a petición del cliente.

- ▶ Asegúrese de que solo el personal autorizado puede modificar, de ser necesario, los ajustes de validación.

Validación poco fiable debido a cambios no autorizados en las reglas de validación y de cálculo

El fabricante no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de modificaciones posteriores no autorizadas de las reglas de validación y de cálculo aceptadas e incluidas en el sistema a petición del cliente, así como de los resultados de las pruebas.

- ▶ Asegúrese de que solo el personal autorizado puede modificar, de ser necesario, las reglas de validación y de cálculo, así como los resultados de las pruebas.

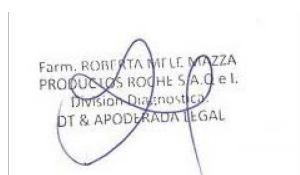

Cortafuegos suministrado por Roche

Para aumentar la seguridad de los sistemas Roche para uPath enterprise software, se debe instalar el cortafuegos suministrado por Roche o por el cliente. Todos los sistemas nuevos conectados a la red del cliente deben instalarse con el cortafuegos de hardware que suministra Roche.

- ▶ La instalación del cortafuegos suministrado por Roche es un método eficaz para añadir un nivel de seguridad adicional entre los productos de Roche y la red del laboratorio del cliente.
- ▶ El uso del cortafuegos suministrado por Roche requiere la asignación de direcciones IP estáticas a los ordenadores de Roche. Las direcciones IP estáticas están reservadas para que los ordenadores de Roche funcionen correctamente.
- ▶ No mueva, desconecte ni reconfigure el cortafuegos suministrado por Roche. Póngase en contacto con la asistencia de Roche para solicitar ayuda.

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A.C e I.
Division Diagnostico
DT & APODERADA LEGAL

Descripción general del software

2	Descripción general del software	27
---	--	----



Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL


Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. Q. e. l.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL


Descripción general del software

Contenidos del capítulo

2

Navegación por uPath software	29
Consulta de la información sobre el producto	29
Navegación por las pantallas del software y configuración del usuario	29
Inicio de sesión en uPath software	30
Cierre de sesión en uPath software	32
Visualización de notificaciones	32
Descripción general de la Asistencia al usuario	34
Acceso a Help & Support	34
Acerca de la Asistencia al usuario	35
Búsqueda en la Asistencia al usuario	36
Filtrado y búsqueda de información	37
Búsqueda con filtros predefinidos	37
Búsqueda sin filtros predefinidos	38
Clasificación por encabezamiento de columna	39
Modificación del tamaño de las columnas	39
Acerca del marcado y etiquetado de casos	39
Asignación de una etiqueta a un caso	40
Adición y eliminación de marcadores de los casos	40
Configuración de las preferencias del usuario	42
Personalización del perfil del usuario	42
Restablecimiento de su contraseña	43
Ajustes de la configuración de la región de interés	45
Configuración de los paneles del visor	46
Configuración del almacenamiento en la memoria caché del cliente	47
Configuración de los indicadores del caso	47
Configuración de notificaciones	48
Apertura y visualización de los paneles en la lista CASES	50
Lista de atajos del teclado	50
Visualización de listas de casos	53
Apertura de paneles de casos	54
Visualización del panel CASE INFO	55
Visualización del panel CASE LOG	56
Visualización del panel SPECIMEN STATUS	57
Visualización del panel PATIENT HISTORY	58

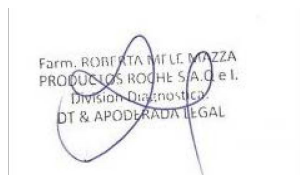

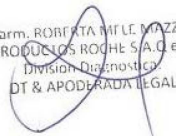

Farm. ROBERTA INFLE. MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A. de L.
Division Diagnostico
DT & APODERADA LEGAL

Navegación por uPath software

Contenidos de esta sección

- Consulta de la información sobre el producto (29)
- Navegación por las pantallas del software y configuración del usuario (29)
- Inicio de sesión en uPath software (30)
- Cierre de sesión en uPath software (32)
- Visualización de notificaciones (32)

Consulta de la información sobre el producto

Puede acceder a la información de producto de uPath enterprise software.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software.


► Cómo visualizar la información sobre el software


- 1 Seleccione la opción **User Settings > About** para consultar la versión del software y su descripción.
- 2 Seleccione el botón **CLOSE** para salir.

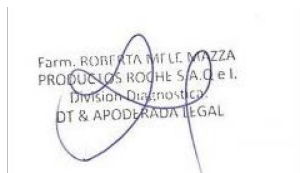

Navegación por las pantallas del software y configuración del usuario

Navegue por las pantallas del software y las opciones de menú para la configuración del usuario y la ayuda y la asistencia mediante el menú **User Settings**. Las opciones de pantalla en el menú dependen de su función y permisos de usuario.

 No utilice las flechas hacia delante o hacia atrás en el navegador para desplazarse entre las pantallas.

 Si configura su perfil de usuario en el primer uso, no necesitará acceder de forma rutinaria a **User Preferences**.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Ha iniciado sesión en uPath software.

► Para navegar por las pantallas y ajustes de usuario

- 1 Seleccione el botón situado bajo su nombre y la función que tiene asignada para abrir el menú **User Settings** y, a continuación, seleccione una opción.

► **Temas relacionados**

- Apertura y visualización de los paneles en la lista CASES (50)
- Filtrado y búsqueda de información (37)
- Tareas del administrador en la gestión de datos (319)
- Tareas del histotécnico en la gestión de datos (334)

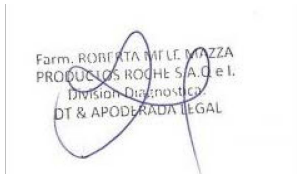

Inicio de sesión en uPath software

Puede acceder a uPath software con Google Chrome, Mozilla Firefox Extended Support o Microsoft Edge (Chromium Core) y, a continuación, iniciar sesión con las credenciales de su cuenta de usuario.

Si está utilizando la versión de uPath enterprise software basada en la nube, el inicio de sesión se lleva a cabo mediante la página de inicio del portal NAVIFY Digital Pathology.

Video clip (.mpg, .mp4): [upath_navifydp_logon.mp4](#)

Title: Inicio de sesión en NAVIFY Digital Pathology


-  Para iniciar sesión en NAVIFY Digital Pathology (31)

Si está utilizando la versión local de uPath enterprise software (que se encuentra instalada y funciona en el servidor y la infraestructura informática del laboratorio), se puede iniciar la sesión en la página de inicio de uPath.

Video clip (.mpg, .mp4): [upath_onprem_logon.mp4](#)

Title: Inicio de sesión en uPath

-  Para iniciar sesión en uPath (31)

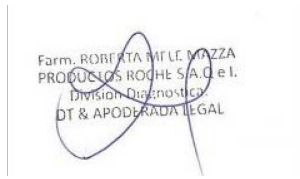


Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con el sistema operativo Windows (El uPath software no es compatible con otros sistemas operativos).
- Ha iniciado sesión en uPath software a través de una conexión a Internet de al menos 30 Mbps. No inicie sesión en uPath software en un teléfono móvil o una tableta.
- Tiene una cuenta de usuario creada en uPath software.


► **Para iniciar sesión en NAVIFY Digital Pathology**

- 1 Introduzca la URL de uPath software en Google Chrome, Mozilla Firefox Extended Support o Microsoft Edge (Chromium Core) y, a continuación, pulse Intro para que se abra la pantalla de inicio de sesión.
- 2 Introduzca una dirección de correo electrónico y, a continuación, seleccione el botón **CONTINUE**.
- 3 Introduzca su contraseña y, a continuación, seleccione el botón **Sign in**.

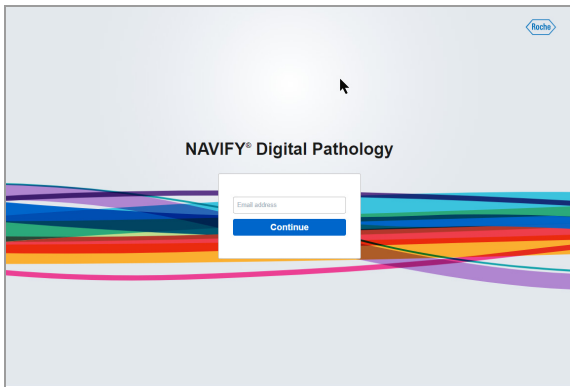

► **Para iniciar sesión en uPath**

- 1 Introduzca la URL de uPath enterprise software en Google Chrome, Mozilla Firefox Extended Support o Microsoft Edge (Chromium Core) y, a continuación, pulse Intro para que se abra la pantalla de inicio de sesión.
- 2 Introduzca su ID de usuario y su contraseña y, a continuación, seleccione el botón **LOGIN**.

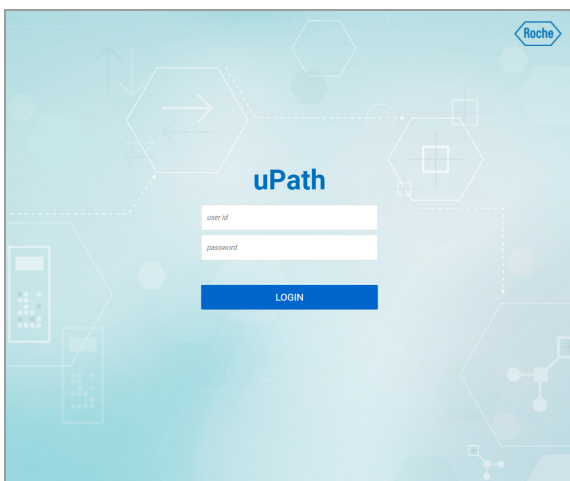

► **Temas relacionados**

- Restablecimiento de su contraseña (43)

Cierre de sesión en uPath software

Cierre la sesión de uPath software después de cada sesión para evitar accesos no autorizados.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en una cuenta de usuario creada en uPath software.


► Para cerrar la sesión

- 1 Seleccione las opciones **User Settings > Logout**.
→ Se abre la pantalla de inicio de sesión de uPath enterprise software.

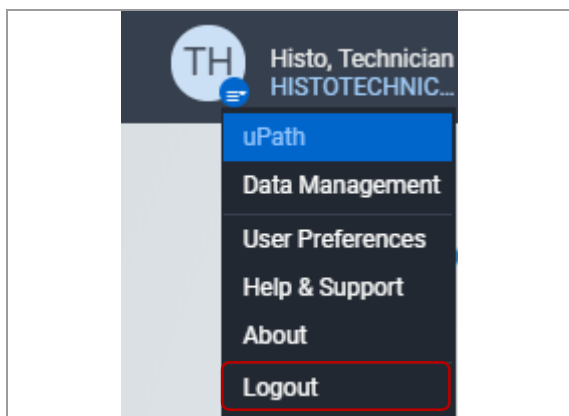


Visualización de notificaciones

El icono de notificación es un indicador situado a la derecha del nombre de usuario y la función que indica la recepción de notificaciones recientes. Un punto azul situado bajo el icono del indicador indica que hay nuevas notificaciones. El número situado a la izquierda del indicador señala el número de nuevas notificaciones.

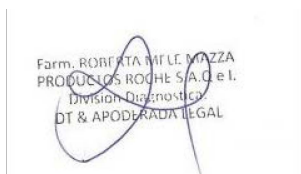

Entre las notificaciones se incluyen elementos de acción. Por ejemplo, un patólogo podría tener nuevos casos asignados.


 Las notificaciones nuevas están relacionadas únicamente con las actividades que se llevan a cabo en uPath software. La cancelación del caso desde el LIS no forma parte de las nuevas notificaciones. Para buscar los casos cancelados, compruebe la carpeta ALL CANCELLED CASES.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software.

► Para visualizar las notificaciones

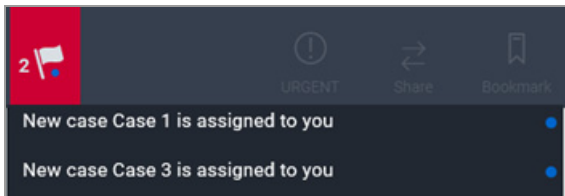

- 1 En la barra del menú Quick Action, seleccione el icono del indicador.

→ El indicador queda destacado en color rojo y se muestra la lista desplegable de notificaciones. Las notificaciones nuevas de la lista se muestran con un punto azul.

- 2 En la lista desplegable, elija una notificación para consultarla.

- Las solicitudes de portaobjetos se abren en la pantalla **Requests** en **Data Management**.
- Las notificaciones de casos se abren en la pantalla **VIEWER**.

→ El punto azul situado a la derecha de la notificación revisada se elimina después de haber abierto y visualizado la notificación.

→ El punto azul bajo el icono del indicador desaparece una vez que se han consultado todas las notificaciones con puntos azules.

► Temas relacionados

- Realización de solicitudes de portaobjetos (338)
- Análisis de las imágenes del portaobjetos (110)



Descripción general de la Asistencia al usuario

La Asistencia al usuario le ayuda en las tareas rutinarias. Está disponible en diferentes formatos (p. ej., en línea y sin conexión).

Contenidos de esta sección

Acceso a Help & Support (34)

Acerca de la Asistencia al usuario (35)

Búsqueda en la Asistencia al usuario (36)

Acceso a Help & Support

Puede acceder a la asistencia al usuario de uPath software mediante el enlace que aparece en el software.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software.

► Para acceder a Help & Support de uPath software

- 1 Seleccione las opciones **User Settings > Help & Support**.
- 2 En el cuadro de diálogo **Help & Support**, elija el enlace correspondiente a la asistencia al usuario.
 - Se abre la Asistencia al usuario de uPath software en otra pestaña del navegador.
- 3 Para cerrar la asistencia al usuario, cierre la pestaña del navegador correspondiente.
- 4 Para cerrar el cuadro de diálogo, seleccione el botón **CANCEL**.

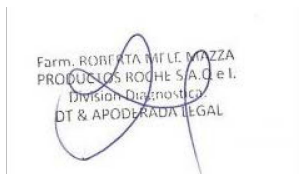

Acerca de la Asistencia al usuario

La ventana de la Asistencia al usuario está dividida en dos paneles, el principal y el panel detallado.

Pestañas del panel principal



Inicio

Para consultar la descripción de las pestañas disponibles. Desde ahí se puede acceder a cada una de las pestañas directamente.



Búsqueda en esta publicación

Para buscar información en el documento completo de la Asistencia al usuario.



Índice

Para obtener una descripción general de la publicación Asistencia al usuario.



Visualizado recientemente


Para obtener una lista de los temas que se han consultado recientemente.



Favoritos


Para guardar los temas que se usan con frecuencia y acceder a ellos directamente en cualquier momento.

Descarga de PDF

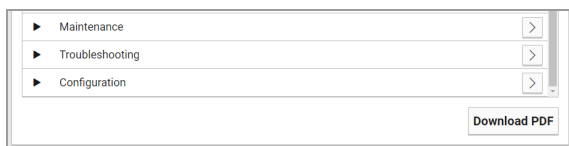




Puede descargar la guía del usuario en el ordenador en formato PDF mediante el botón **Download PDF**.

Ampliación de las imágenes

Puede ampliar las imágenes mediante el botón  que aparece junto a ellas. La imagen se muestra en una leyenda en la que se puede llevar a cabo la ampliación mediante el control deslizante.

Reproducción de vídeos

La Asistencia al usuario contiene vídeos que sirven como ayuda a la hora de realizar determinadas tareas. Puede reproducir un vídeo mediante el botón . Puede volver a ver el vídeo con el botón .

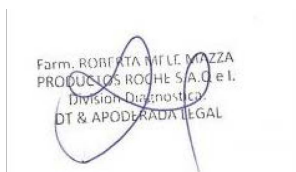

Búsqueda en la Asistencia al usuario

Encuentre la información rápidamente en la Asistencia al usuario mediante las funciones de búsqueda.

Resultados de la búsqueda

La tabla **Search results** enumera los 20 temas con una posición más elevada en la clasificación.

El término que ha introducido en la búsqueda aparece destacado. Si ha introducido un término obsoleto en la búsqueda, se destacará el término elegido para sustituirlo.

Tipos de temas

El icono que aparece a la izquierda de los resultados de búsqueda muestra el tipo de tema:



Descripción

Explica los conceptos y ofrece información contextual adicional.



Procedimiento

Explica cómo llevar a cabo una tarea de forma detallada.





Referencia

Facilita información de referencias.

► Para buscar en la Asistencia al usuario

- 1 Seleccione la pestaña de la Asistencia al usuario.
- 2 Para llevar a cabo una búsqueda, introduzca el término que quiere buscar y seleccione el botón .
 - Se realiza la búsqueda en la Asistencia al usuario y se enumeran los 20 temas que ocupan las posiciones superiores en la clasificación. El término que ha introducido en la búsqueda aparece destacado. Filtre la búsqueda si no encuentra los que está buscando.

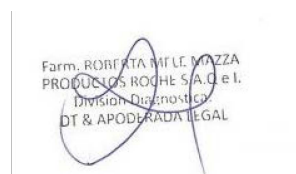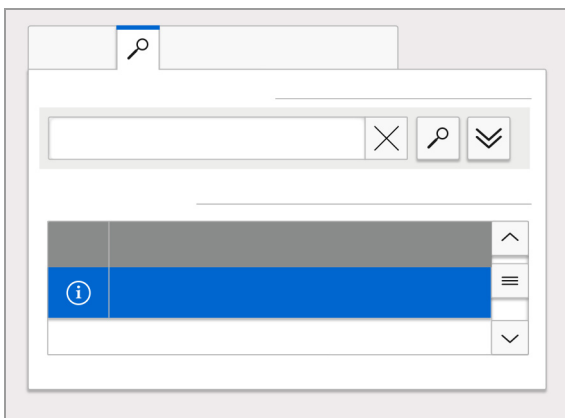

Filtrado y búsqueda de información


Contenidos de esta sección

- Búsqueda con filtros predefinidos (37)
- Búsqueda sin filtros predefinidos (38)
- Clasificación por encabezamiento de columna (39)
- Modificación del tamaño de las columnas (39)
- Acerca del marcado y etiquetado de casos (39)
- Asignación de una etiqueta a un caso (40)
- Adición y eliminación de marcadores de los casos (40)

Búsqueda con filtros predefinidos

Utilice filtros predefinidos para buscar pacientes, casos, patólogos asignados y cualquier otra información en una lista de casos.

Los filtros predefinidos se muestran cuando selecciona el botón Search.

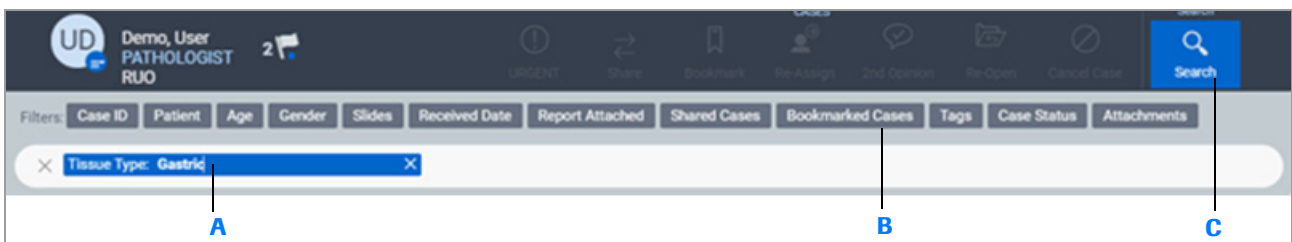

- A** Introduzca texto libre en el filtro predefinido o déjelo vacío.
- B** Seleccione uno o varios filtros predefinidos.
- C** Seleccione el botón Search para ver el cuadro de búsqueda y los filtros predefinidos.


Los filtros predefinidos pueden estar vacíos o puede introducir texto libre. Los siguientes ejemplos muestran un filtro vacío y un filtro con texto libre.




Si el filtro predefinido está vacío, la lista de casos se clasifica por la columna del patólogo asignado.



Si el filtro predefinido incluye texto libre, la lista de casos clasifica la columna del patólogo asignado por ese valor.

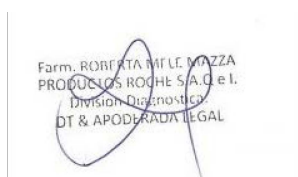


► Para buscar con filtros

- 1 Seleccione **CASES > FOLDERS** y, a continuación, seleccione una carpeta para abrir una lista de casos.
- 2 Seleccione el botón **Search**. Seleccione uno o más filtros predefinidos para añadirlos al campo **Search**.
 - En el filtro, introduzca el texto libre que desea encontrar.
- 3 Pulse Intro para iniciar la búsqueda.
 - Se muestra el resultado que coincide con el texto libre. Si el resultado no coincide, se muestra el resultado "0 cases match your search criteria".
- 4 Seleccione el botón  para eliminar un filtro.

Búsqueda sin filtros predefinidos

Puede buscar listas de casos para pacientes, casos, patólogos asignados y cualquier otra información.

► Para buscar sin filtros

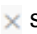- 1 Seleccione **CASES > FOLDERS** y, a continuación, seleccione una carpeta para abrir una lista de casos.
- 2 Seleccione el botón **Search**.
- 3 En el campo de búsqueda, introduzca el texto libre y pulse Intro para iniciar la búsqueda.
 - Se muestran los resultados que coinciden con el texto libre. Si no hay coincidencias, la línea de mensaje muestra el texto «No hay casos que coincidan con los criterios de búsqueda».
- 4 Para borrar el contenido del campo de búsqueda, seleccione el botón  situado en la barra de búsqueda.



Farm. ROBFATA INFLE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A.O e l.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Clasificación por encabezamiento de columna

Las columnas se pueden clasificar por orden ascendente o descendente.

► Para clasificar las columnas


- 1 Seleccione el encabezado de la columna en función del cual quiere clasificar la lista.
- 2 Seleccione de nuevo el encabezado de la columna para cambiar el orden de clasificación.
 - ❶ La clasificación que haya realizado solo se conserva durante el inicio de sesión y la clasificación vuelve al orden predeterminado cuando se cierra la sesión.

Modificación del tamaño de las columnas

Las columnas se pueden redimensionar en la lista de casos.


► Para modificar el tamaño de las columnas

- 1 Seleccione y arrastre la barra de encabezado de columnas para aumentar o disminuir el tamaño de las columnas.
 - ❶ Aparecerán puntos suspensivos si la columna es demasiado pequeña como para mostrar todo el encabezado.

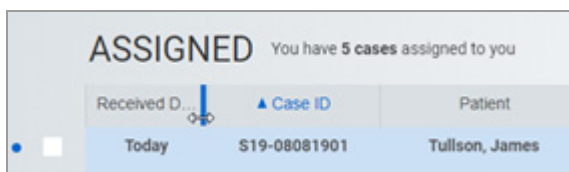

Acerca del marcado y etiquetado de casos

Una vez se le haya asignado un caso, puede asignarle una etiqueta o un marcador.

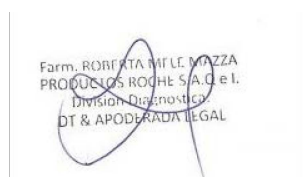

Los marcadores y etiquetas son herramientas útiles para buscar y recuperar casos. No se incluirán en el informe final del caso.

Asignación de una etiqueta a un caso


Una etiqueta es una descripción de texto que puede asignar a un caso y utilizarla más adelante para buscar dicho caso. Puede aplicar una o más etiquetas a un mismo caso.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para asignar una etiqueta a un caso

- 1 Seleccione **CASES > FOLDERS** y, a continuación, seleccione una carpeta para abrir una lista de casos.
- 2 En la lista de casos, seleccione un caso al que desee añadirle la etiqueta.
 - ❶ Solo puede etiquetar un caso cada vez.
- 3 En el campo **Enter case tag here** del panel **CASE TAGS**, introduzca la nueva etiqueta del caso.
 - ❶ Si desea eliminar la etiqueta del caso, seleccione el icono  que se encuentra al final de la etiqueta.
- 4 Haga clic fuera del panel **CASE TAGS** para salir de la función.
 - La etiqueta se mostrará en la columna **Tags** de la lista de casos.

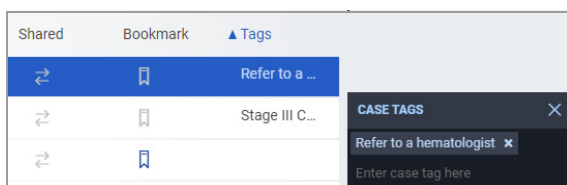


Adición y eliminación de marcadores de los casos

Puede colocar marcadores para destacar los casos que se le han asignado y mostrarlos en la carpeta **Bookmark**.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.
- Para poder colocar un marcador, debe tener asignado el caso. Los casos asignados se muestran en la lista de casos en negrita.

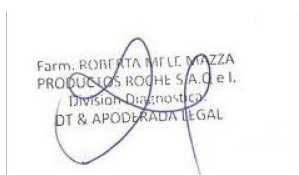

► Para añadir marcadores a un caso o eliminarlos

- 1 En la lista **ASSIGNED CASES**, seleccione los casos a los que desee añadir un marcador.
- 2 En la barra de menú Quick Action, seleccione el botón **Bookmark**.
 - Los casos presentan el icono de marcador en la lista, en negrita.
- 3 Para eliminar el marcador, seleccione los casos correspondientes y, a continuación, seleccione el botón **Bookmark**.
 - El icono de marcador se indica en redonda para los casos seleccionados.

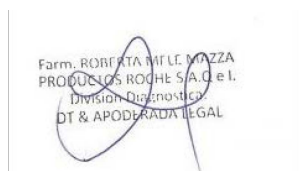

Configuración de las preferencias del usuario

Contenidos de esta sección

- Personalización del perfil del usuario (42)
- Restablecimiento de su contraseña (43)
- Ajustes de la configuración de la región de interés (45)
- Configuración de los paneles del visor (46)
- Configuración del almacenamiento en la memoria caché del cliente (47)
- Configuración de los indicadores del caso (47)
- Configuración de notificaciones (48)

Personalización del perfil del usuario

Puede añadir una imagen identificativa o una firma digital a su perfil de usuario.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con su cuenta de usuario.
- Los formatos válidos para la imagen del perfil son .jpeg, .png, .gif o .bmp.
- La imagen de la firma digital debe tener como mínimo 150 píxeles de ancho por 150 píxeles de alto y debe estar en formato .jpeg, .png, .gif o .bmp.

► Para añadir una imagen o una firma digital a su perfil de usuario

- 1 Seleccione **User Settings > User Preferences > User Profile**.
- 2 Para cambiar la **Profile Image**, desplace el puntero sobre el cuadro **Profile Image** y seleccione **Change Image**.

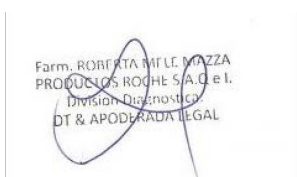

- 3 En el cuadro de diálogo **Open**, desplácese hasta el archivo que desea y, a continuación, seleccione **Open**.
 - Utilice el control deslizante situado bajo la imagen para ampliar y reducir.
 - Para ordenar la imagen en el cuadro **Profile Image**, seleccione y arrastre la imagen en su posición.
- 4 En el campo **Digital Signature**, seleccione el botón **Upload**.
- 5 En el cuadro de diálogo **Open**, desplácese hasta el archivo que desea y, a continuación, seleccione **Open**.
- 6 En el campo **Printed Signature**, introduzca su nombre y, a continuación, seleccione el botón **SAVE**.

Restablecimiento de su contraseña

Puede restablecer la contraseña de su cuenta de usuario cuando sea necesario. La forma de restablecer la contraseña varía en función del acceso a uPath enterprise software, mediante el portal NAVIFY Digital Pathology o a través de la pantalla de inicio de sesión de uPath.

Si está utilizando la versión local de uPath enterprise software (que se encuentra instalada y funciona en el servidor y la infraestructura informática del laboratorio), se puede restablecer la contraseña en **User Preferences**.

Video clip (.mpg, .mp4): [upath_onprem_resetpassword.mp4](#)
Title: Restablecimiento de contraseña mediante uPath

▶ Para restablecer la contraseña en uPath (44)





Restablezca la contraseña cada 30 días o en el momento en que sospeche que alguien puede conocerla.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Tiene una cuenta de usuario uPath software activa.

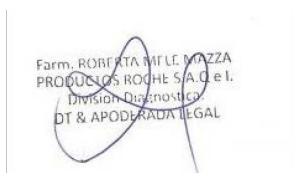


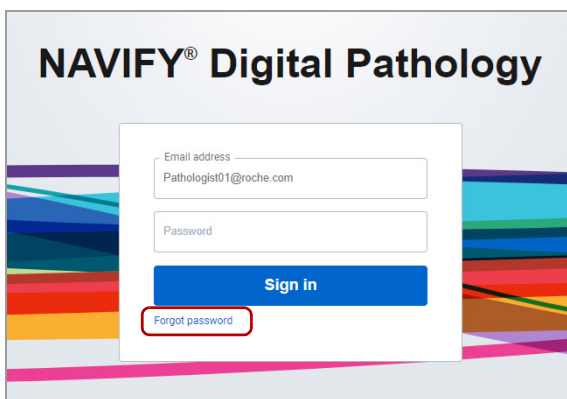


► Para restablecer la contraseña en NAVIFY Digital Pathology

- 1 En la pantalla de inicio de sesión de **NAVIFY Digital Pathology**, introduzca su dirección de correo electrónico y, a continuación, seleccione el botón **CONTINUE**.
- 2 Seleccione el enlace **Forgot password**.
- 3 Seleccione el botón **Reset via Email**.
 - ❶ Si elige el hipervínculo **Return to Sign in** en lugar del botón **Reset via Email**, puede iniciar la sesión con la contraseña que tiene en ese momento.
 - Recibirá un correo electrónico con un código de verificación.
- 4 Introduzca su código y, a continuación, seleccione el botón **VERIFY**.
- 5 Responda a la pregunta de seguridad y, a continuación, seleccione el botón **VERIFY**.
- 6 Introduzca una contraseña nueva y, a continuación, seleccione el botón **SUBMIT**.

► Para restablecer la contraseña en uPath

- 1 Una vez que haya iniciado sesión en uPath enterprise software a través de la pantalla de inicio de sesión de uPath, elija las opciones **User Settings > User Preferences > Reset Password**.
- 2 Introduzca su **Current Password**.
- 3 Introduzca la nueva contraseña en **New Password** y especifique exactamente la misma información en **Confirm New Password**.
- 4 Seleccione el botón **SAVE** y confirme la acción cuando se le solicite.

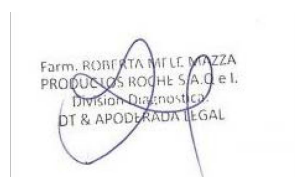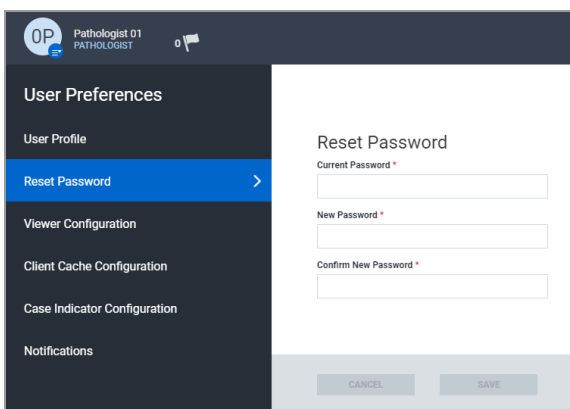

Ajustes de la configuración de la región de interés

Puede definir cómo visualizará una región de interés (ROI) en la imagen de un portaobjetos.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con su cuenta de usuario.

► Para configurar los ajustes de la región de interés

- 1 Seleccione **User Settings > User Preferences > Viewer Configuration**.
- 2 Para modificar **ROI Exclusion Style**, realice una de las siguientes operaciones:
 - **Modify ROI with Exclusion**: seleccione esta opción para ocultar las regiones excluidas de una ROI en su muestra de tejido.
 - **Overlay ROI with Exclusion**: seleccione esta opción para mostrar las regiones excluidas de una ROI en su muestra de tejido.
- 3 Para modificar **Unit of Measurement**, seleccione la medición que desea utilizar.
- 4 Para modificar **Custom ROI Dimensions**, introduzca la siguiente información:
 - **Height**: introduzca la altura máxima de la región de interés.
 - **Width**: introduzca la anchura máxima de la región de interés.
- 5 Para modificar **Pan/Zoom Performance**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Sharp**: seleccione esta opción para mostrar una imagen del portaobjetos nítida.
 - **Balanced**: seleccione esta opción para mostrar un equilibrio entre una imagen del portaobjetos nítida y lisa.
 - **Smooth**: seleccione esta opción para mostrar una imagen del portaobjetos lisa.
- 6 Seleccione **SAVE**.

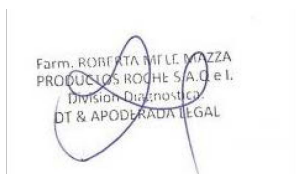

► Temas relacionados

- Lista de atajos del teclado (50)

Configuración de los paneles del visor

Puede personalizar los paneles que se muestran automáticamente cuando se consultan y se analizan los casos. Los valores predeterminados de los paneles funcionan junto con los ajustes predeterminados de uPath software que ha configurado el administrador.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con su cuenta de usuario.

► Para configurar los paneles

- 1 Seleccione **User Settings > User Preferences > Viewer Configuration**.
- 2 Para modificar la sección **Panel**, marque o desmarque la casilla de verificación **Visible** de cualquiera de las siguientes opciones del panel:
 - **Slide Navigator**
 - **All Slides**
 - **Zoom**
 - **Rotate**
 - **Notes**
 - **Case Log**
 - **Focus Level**
 - **Slide Tracking**
 - **Color Legend**
 - **Patient History**
 - **Thumbnail**
 - **Slide Info**

❶ Cuando en uPath software se ha anulado la opción de los ajustes de configuración del panel, no podrá marcar ni desmarcar un panel.
- 3 Seleccione **SAVE**.

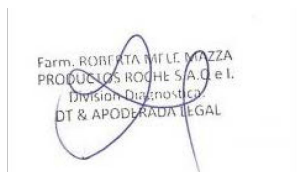

Configuración del almacenamiento en la memoria caché del cliente

A fin de optimizar el rendimiento mediante el almacenamiento de las imágenes de portaobjetos consultadas en la memoria caché, puede configurar la opción de almacenamiento en la memoria caché del cliente.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con su cuenta de usuario.


► Para configurar el almacenamiento en la memoria caché del cliente

- 1 Seleccione **User Settings > User Preferences > Client Cache Configuration**.
- 2 Seleccione la opción **On** o la opción **Off** para activar o desactivar el almacenamiento en la memoria caché del cliente.
- 3 Si el almacenamiento en la memoria caché está activado, introduzca el tamaño de la memoria caché (en GB) y la cantidad de días que deben transcurrir para que se eliminen los elementos de la memoria.
- 4 Descargue **Client Cache Installer** y ejecute el archivo de ejecución.
- 5 Seleccione **SAVE**.

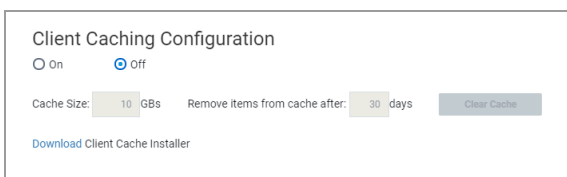

Configuración de los indicadores del caso

Los indicadores del caso son barras con códigos de color que usted define por usted que muestran cuándo se asigna y vence un caso. Las barras aparecen en los casos que se le han asignado en la pantalla **CASES**.

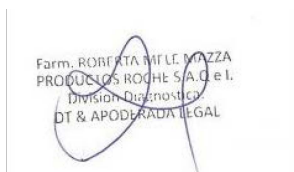


Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con su cuenta de usuario con credenciales de patólogo.

► Para configurar los indicadores del caso

- 1 Seleccione **User Settings > User Preferences > Case Indicator Configuration**.
- 2 Para que se aplique la opción **Automatically Flag Cases**, seleccione **On**.
- 3 Para que se aplique la opción **Flag Configuration**, introduzca la cantidad de días que deben transcurrir para que aparezca la barra de recordatorio con código de color en el caso.
 - Por ejemplo, si cierra un caso, puede querer que aparezca una barra indicadora en naranja un día después y una barra indicadora roja a los tres días.
- 4 Seleccione el botón **SAVE**.

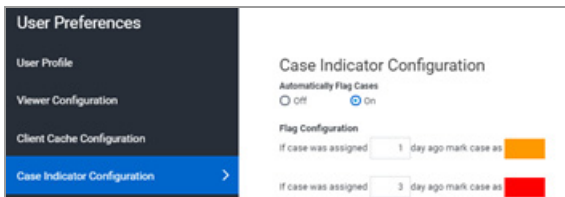

Configuración de notificaciones

Puede configurar sus preferencias de usuario para enviar las notificaciones a su dirección de correo electrónico.

💡 Solo puede recibir notificaciones por correo electrónico si el administrador realiza la configuración del servidor del correo electrónico.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Ha iniciado sesión en uPath software con su cuenta de usuario.

► Para configurar notificaciones por correo electrónico

- 1 Seleccione **User Settings > User Preferences > Notifications**.
- 2 Para ver **Email Notifications**, seleccione **On**.
 - Si selecciona **On**, se enviarán Notifications a la dirección de correo electrónico de su cuenta de usuario.
- 3 En el campo **Email**, introduzca una nueva dirección para las notificaciones o mantenga la predeterminada.

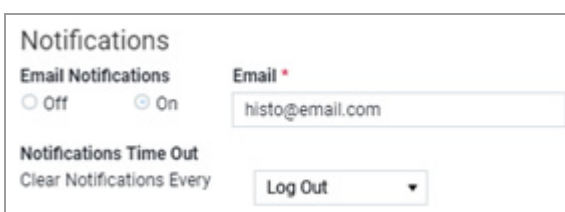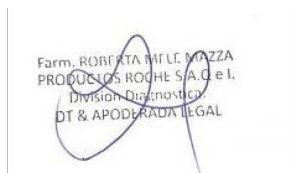

- 4 En la lista **Clear Notifications Every**, seleccione una opción para eliminar automáticamente una notificación de la lista.
 - **Log Out**: elimina las notificaciones cuando cierra sesión.
 - **Day**: Elimina las notificaciones cada día a la hora a la que ha guardado la configuración. Por ejemplo, si selecciona Day y guarda la configuración el miércoles a las 10:00 a. m., las notificaciones se eliminarán cada día a las 10:00 a. m.
 - **Week**: Elimina las notificaciones cada semana el día de la semana que haya guardado la configuración.
 - **Month**: Elimina las notificaciones cada mes el día de la semana que haya guardado la configuración.
- 5 En la tabla **Notify me**, seleccione las casillas de verificación correspondientes y, a continuación, seleccione **SAVE**.

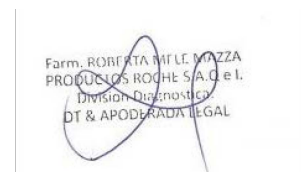

Farm. ROBERTA M.F.L. MOZZA
PRODUCLOS ROCHE S.A. s.r.l.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Apertura y visualización de los paneles en la lista CASES

Puede abrir un panel del caso para ver la información u ocultarla.

Contenidos de esta sección

- Lista de atajos del teclado (50)
- Visualización de listas de casos (53)
- Apertura de paneles de casos (54)
- Visualización del panel CASE INFO. (55)
- Visualización del panel CASE LOG. (56)
- Visualización del panel SPECIMEN STATUS (57)
- Visualización del panel PATIENT HISTORY (58)

Lista de atajos del teclado


Navegación entre las listas de casos

Los atajos del teclado para las pantallas **CASES**, **VIEWER** y **REPORT** se enumeran en las siguientes listas.

Utilice los atajos del teclado para navegar por las listas de casos en la pantalla **CASES**.

Atajo del teclado	Objetivo
MAYÚS + TAB	Cuando una pantalla contiene diversas listas de casos (por ejemplo, URGENT y ASSIGNED) utilice este atajo para moverse entre ellas.
Flechas de arriba y abajo	Navegue arriba y abajo entre los casos de una lista.
a: Assigned b: Bookmark p: Shared o: Second Opinion t All Active Cases x: All Canceled Cases d: All Signed Out Cases	Seleccione una carpeta.

☰ Atajos del teclado para navegar entre las listas de casos

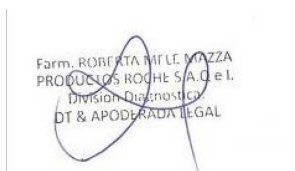

Acciones del caso en la pantalla CASES

Seleccione un caso y, a continuación, utilice los atajos del teclado para las acciones del caso.

Atajo del teclado	Objetivo
v	Navegar por la pantalla VIEWER para el caso seleccionado.
r	Navegar por la pantalla REPORT para el caso seleccionado.
u	Marcar y desmarcar un caso como URGENT .
b	Marcar o eliminar la marcación de un caso.
s	Compartir el caso.
2	Solicitar una segunda opinión del caso.
a	Reasignar el caso.
o	Reabrir el caso.
c	Cancelar el caso.

☰ Atajos del teclado para las acciones del caso

Abrir paneles en la pantalla CASES

Utilice los atajos del teclado para abrir los paneles de la pantalla **CASES**.

Atajo del teclado	Objetivo
ALT+F1	Abrir el panel FOLDERS
ALT+F2	Abrir el panel CASE INFO
ALT+F3	Abrir el panel SPECIMEN STATUS
ALT+F5	Abrir el panel CASE TAGS
ALT+F8	Abrir el panel CASE LOG
ALT+F12	Abrir el panel PATIENT HISTORY
ALT+F7	Abrir el panel ATTACHMENTS


☰ Atajos del teclado para abrir paneles de la pantalla CASES

Buscar y mostrar notificaciones

Atajos del teclado para buscar y mostrar notificaciones.

Atajo del teclado	Objetivo
f	Seleccionar la función de búsqueda. Seleccione "f" para cerrar la función de búsqueda.
n	Mostrar la lista de indicadores de notificaciones. Haga clic fuera de las notificaciones o vuelva a seleccionar "n" para cerrar las notificaciones.

☰ Otros atajos del teclado

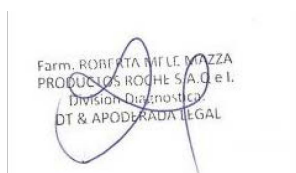

Seleccionar portaobjetos de la pantalla VIEWER

Utilice los atajos del teclado para seleccionar un portaobjetos de la pantalla **VIEWER**.

Atajo del teclado	Objetivo
CTRL+flecha izquierda	Navegar por un portaobjetos o seleccionarlo en el área principal de visualización y en el panel ALL SLIDES .
CTRL+flecha derecha	
CTRL+flecha arriba	
CTRL+flecha abajo	

☒ Atajos del teclado para seleccionar portaobjetos en la pantalla VIEWER

Moverse por la imagen del portaobjetos en la pantalla VIEWER

Utilice los atajos del teclado para moverse por la imagen del portaobjetos.

Atajo del teclado	Objetivo
Izquierda Derecha Arriba Abajo	Utilícelos en el portaobjetos seleccionado para mover la imagen.
ALT +	Rotar el portaobjetos seleccionado a la izquierda
ALT -	Rotar el portaobjetos seleccionado a la derecha
+ -	Ampliar o reducir la imagen de un portaobjetos seleccionado.
CTRL + click	Seleccionar varios ROI.
a	Selecciónelo repetidamente en un portaobjetos seleccionado para navegar secuencialmente a través de las ROI. Las ROI se seleccionarán en la imagen del área principal de visualización y en el SLIDE PANEL , y en la ubicación indicada en los paneles SLIDE NAVIGATOR y ALL SLIDES .

☒ Atajos del teclado para moverse por la imagen del portaobjetos

Abrir los paneles de la pantalla VIEWER

Utilice los atajos del teclado para navegar por la pantalla **VIEWER**.

Atajo del teclado	Objetivo
ALT+F1	Abrir el panel SLIDE NAVIGATOR
ALT+F2	Abrir el panel ALL SLIDES
ALT+F3	Abrir el SLIDE PANEL
ALT+F5	Abrir el panel ZOOM
ALT+F6	Abrir el panel ROTATE
ALT+F7	Abrir el panel NOTES
ALT+F8	Abrir el panel CASE LOG
ALT+F9	Abrir el panel FOCUS LEVEL

☒ Atajos del teclado para abrir paneles de la pantalla VIEWER

Atajo del teclado	Objetivo
ALT+F10	Abrir el panel SLIDE TRACKING
ALT+F11	Abrir el panel COLOR LEGEND
ALT+F12	Abrir el panel PATIENT HISTORY
F8	Abrir el panel THUMBNAIL
F9	Abrir el panel SLIDE INFO

☰ Atajos del teclado para abrir paneles de la pantalla VIEWER

Navegación en la pantalla VIEWER

Utilice los atajos del teclado para navegar por la pantalla **VIEWER**.

Atajo del teclado	Objetivo
w	Mover el cursor al panel NOTES para editar las notas del CASE .
c	Navegar a la pantalla CASES .
r	Navegar a la pantalla REPORT .

☰ Atajos del teclado para abrir paneles de la pantalla VIEWER

Navegación en la pantalla REPORT

Utilice los atajos del teclado para navegar por la pantalla **VIEWER**.

Atajo del teclado	Objetivo
p	Utilícelo para seleccionar el botón Preview & Sign-Out .
c	Utilícelo para navegar a la pantalla CASES .
v	Utilícelo para navegar a la pantalla VIEWER .


☰ Atajos del teclado para la pantalla REPORT


Visualización de listas de casos

Las listas de casos se muestran en el área principal de la pantalla **CASES**. Puede abrir una lista de casos específica y ver la información acerca del caso, así como redimensionar la anchura de las columnas.

Las listas de casos incluyen la fecha en la que se recibe o se cierra un caso, el ID del caso, la información del paciente, el tipo de tejido, los elementos adjuntos y el número de portaobjetos.

Puede acceder a las listas de casos desde el panel **FOLDERS**. El número de casos en cada lista de casos se muestra al lado del nombre de la carpeta.

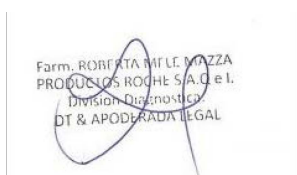

 Para alertarle de que se han producido cambios en el caso, se muestra un punto azul al lado del número de casos.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignado el permiso correcto.

► Para abrir las listas de casos

- 1 Seleccione **CASES > FOLDERS**.
- 2 Seleccione una carpeta para visualizar una lista de casos.

» **Temas relacionados**

- Clasificación por encabezamiento de columna (39)
- Apertura de paneles de casos (54)

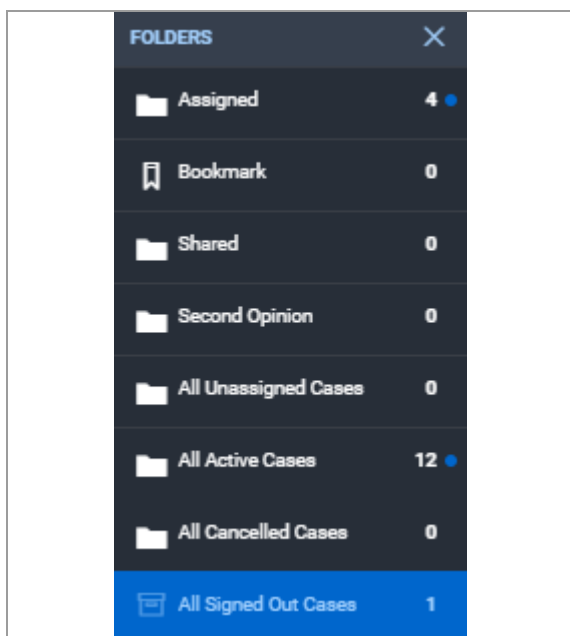

Apertura de paneles de casos


Cuando seleccione un caso individual, la información relativa a ese caso se muestra en los paneles de información.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignado el permiso correcto.

► Para abrir los paneles en la página de la lista CASES

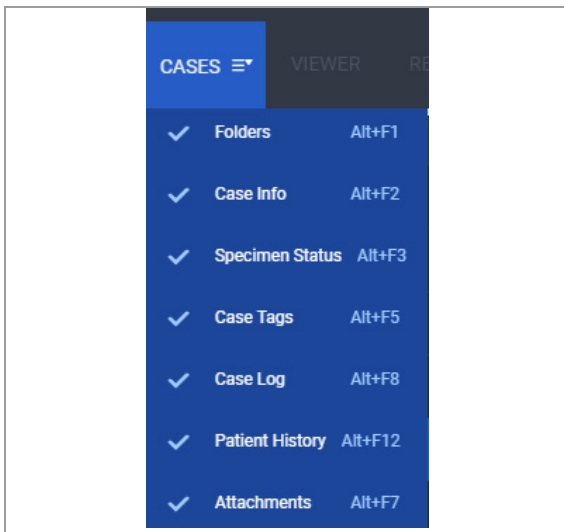

- 1 Seleccione el menú **CASES** para visualizar una lista de paneles.
 - ❶ La lista del panel solo se muestra momentáneamente. Para mantenerla abierta, sitúe el cursor del ratón sobre la lista.
- 2 Seleccione el panel que quiere que se muestre y haga clic fuera de la lista desplegable para cerrar el menú **CASES**.
 - La lista de casos se abre y los paneles seleccionados se muestran en el lado derecho del área principal de visualización de la pantalla **CASES**.
- 3 Para ocultar un panel, seleccione el botón  o elimine la casilla de verificación de la lista **CASES**.

► Temas relacionados

- Visualización del panel CASE INFO. (55)
- Visualización del panel CASE LOG. (56)
- Visualización del panel SPECIMEN STATUS (57)
- Visualización del panel PATIENT HISTORY (58)


Visualización del panel CASE INFO.

Puede revisar la información del paciente, el tipo de tejido y el tipo de muestra (portaobjetos o bloques), y la información del médico remitente en el panel **CASE INFO**.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignado el permiso correcto.

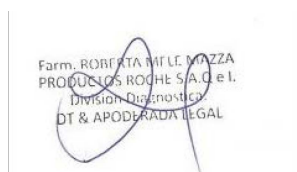


► Para visualizar el panel CASE INFO

- 1 Seleccione **CASES > FOLDERS** y, a continuación, seleccione una carpeta para abrir una lista de casos.
- 2 Seleccione un caso para consultar la información resumida en el panel **CASE INFO**.



Si el estado del caso es URGENT, se muestra un cuadro de advertencia rojo al lado del nombre del paciente.

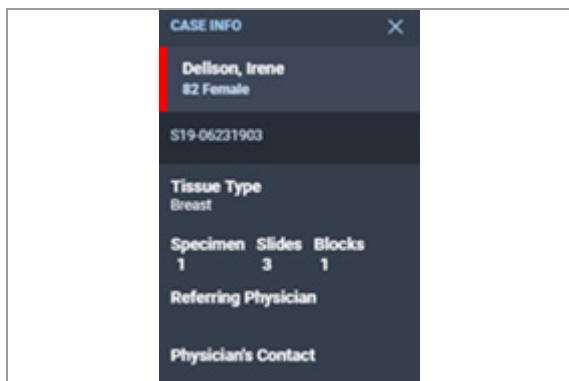

► Temas relacionados

- Visualización del panel CASE LOG. (56)
- Visualización del panel SPECIMEN STATUS (57)
- Visualización del panel PATIENT HISTORY (58)

Visualización del panel CASE LOG.

Puede visualizar todas las acciones para un caso en el panel **CASE LOG**.






Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignado el permiso correcto.

► Para visualizar el panel CASE LOG

- 1 Elija una carpeta del panel **FOLDERS** para abrir la lista de casos.
- 2 Seleccione un caso para consultar la actividad de inicios de sesión en el panel **CASE LOG**.
 - En el panel **CASE LOG** se hace un seguimiento de la actividad por fecha. En cada fecha, el registro facilita información sobre el usuario, la actividad y la hora a la que se ha realizado esta.
- 3 Para visualizar las entradas para una fecha específica, seleccione la flecha situada al lado de la fecha.
 - Se muestra una lista desplegable de usuarios que llevaron a cabo alguna tarea en el caso en esa fecha.

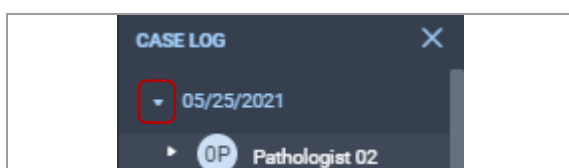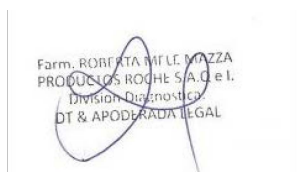

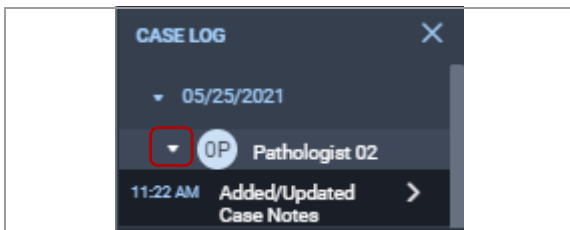

- 4 Para visualizar los cambios realizados por un usuario, seleccione la flecha situada al lado del ID del usuario.
 - Se muestra una lista desplegable con los cambios realizados por el usuario seleccionado en la fecha seleccionada.

Temas relacionados

- Visualización del panel CASE INFO. (55)
- Visualización del panel SPECIMEN STATUS (57)
- Visualización del panel PATIENT HISTORY (58)

Visualización del panel SPECIMEN STATUS

Revise la lista de muestras y el número de portaobjetos asociados con la muestra para un caso.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignado el permiso correcto.

Para visualizar SPECIMEN STATUS

- 1 Seleccione **CASES > FOLDERS** y, a continuación, seleccione una carpeta para abrir una lista de casos.
- 2 Seleccione un caso para consultar un resumen del estado de su muestra en el panel **SPECIMEN STATUS**.
 - Se muestra el panel **SPECIMEN STATUS** con el número de portaobjetos disponibles para cada muestra.
- 3 Seleccione el icono de portaobjetos situado al lado de una muestra para visualizar el panel **MORE INFORMATION**.
 - Cada portaobjetos se identifica según el tipo de tinción y su estado.
- 4 En el panel **MORE INFORMATION**, seleccione un portaobjetos para desplazarse a la pantalla **VIEWER** y consultar el portaobjetos y otros asociados con el caso.

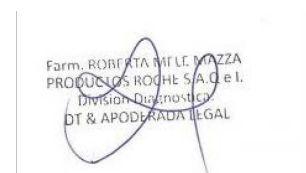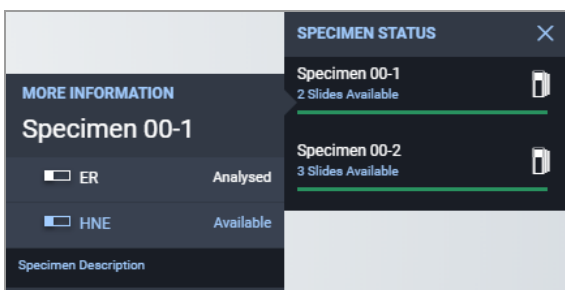

Temas relacionados

- Visualización del panel CASE INFO. (55)
- Visualización del panel CASE LOG. (56)
- Visualización del panel PATIENT HISTORY (58)

Visualización del panel **PATIENT HISTORY**

Puede visualizar el tipo de tejido y la fecha en la que se asoció el caso con un paciente.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignado el permiso correcto.
- No incorpore información sobre la salud del paciente (PHI) en las etiquetas de la imagen ni en los archivos adjuntos. Convierta la PHI en anónima o desidentifíquela en la etiqueta de la imagen o en sus archivos adjuntos.

Para visualizar **PATIENT HISTORY**



- Seleccione **CASES > FOLDERS** y, a continuación, seleccione una carpeta para abrir una lista de casos.
- Seleccione un caso para consultar un resumen en el panel **PATIENT HISTORY**.
 - La **PATIENT HISTORY** se rellena con información para el caso y todos los otros casos asociados con el paciente.

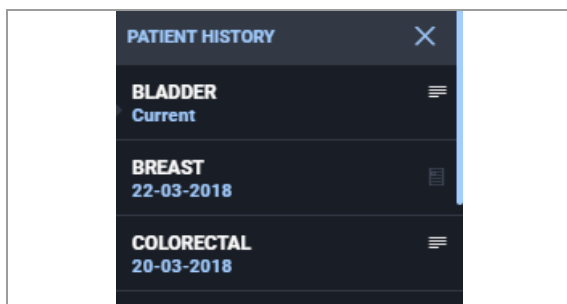

Farm. ROBERTA MIT LI. MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. Q. e. l.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

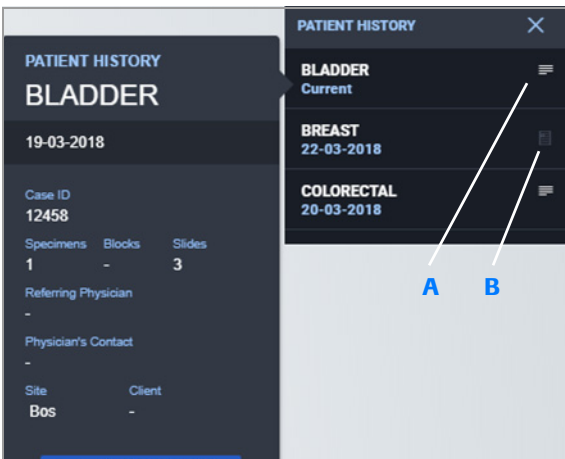

A Icono de detalles para un caso abierto **B** Icono de informe para un caso completado

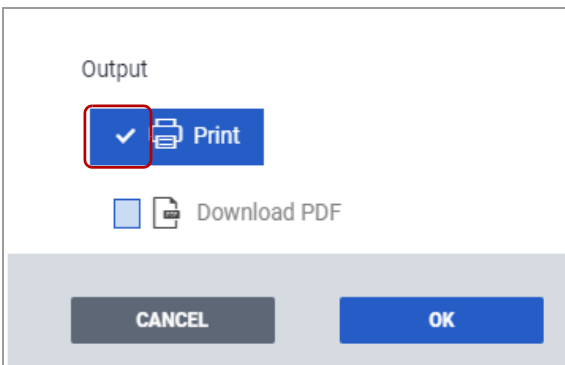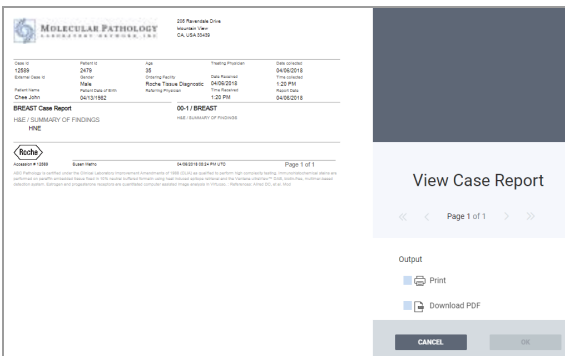

3 Seleccione el icono de detalles o de informe situado al lado de un caso para visualizar un panel con la información del paciente para ese caso.

→ Se muestra un panel **PATIENT HISTORY** secundario con información sobre la muestra y el caso.

4 Seleccione el botón **VIEW CASE SUMMARY** para consultar el resumen de un caso.

→ Se muestra el cuadro de diálogo **View Case Summary**.

5 Seleccione el botón **VIEW CASE REPORT** para visualizar el informe de caso para un caso cerrado.

❗ Si no se ha cerrado el caso, el resumen se encontrará vacío con un mensaje en rojo indicando que el caso no se ha cerrado.

→ Se muestra el cuadro de diálogo **View Case Report**.

6 Marque la casilla de verificación situada al lado del formato de salida del informe: una versión impresa, un PDF o ambos.

7 Seleccione **OK** para imprimir el informe o **CANCEL** para cerrar el cuadro de diálogo.

❗ El panel secundario abierto con un informe cerrado se cerrará automáticamente.

📖 **Temas relacionados**

- Visualización del panel CASE INFO. (55)
- Visualización del panel CASE LOG. (56)
- Visualización del panel SPECIMEN STATUS (57)



Farm. ROBERTA NITILE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. Q e I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Visualización de casos y análisis de portaobjetos

3	Gestión de casos e imágenes de portaobjetos.....	63
---	--	----

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL


Gestión de casos e imágenes de portaobjetos

Contenidos del capítulo

3

Administración de casos	67
Acerca de los permisos del patólogo del centro y cliente.	67
Acerca de la información del caso.	68
Visualización de la lista de casos.	69
Anulación de un caso	71
Reapertura de un caso	72
Creación de un suplemento para añadir una solicitud de portaobjetos.	73
Enmienda de la información de un caso cerrado	74
Corrección de un informe	76
Visualización y análisis de portaobjetos	78
Apertura y cierre de los paneles del visor.	78
Consulta de la información sobre portaobjetos.	80
Consulta de una nota en el panel NOTES.	81
Adición de una nota a la imagen del portaobjetos o al caso	82
Agregar información de la configuración de la tinción	83
Acerca de la configuración de la tinción.	83
Introducir la información de configuración de la tinción	83
Solicitud de volver a escanear un portaobjetos	85
Revisión y cualificación de los portaobjetos.	86
Acerca de la cualificación de los portaobjetos	86
Acerca de la repetición del escaneado de un portaobjetos	87
Revisión y edición de portaobjetos	87
Repetición del escaneado de un portaobjetos	89
Exclusión de un portaobjetos	90
Creación y modificación de una región de interés	93
Creación de una región de interés en una imagen del portaobjetos	93
Edición de una región de interés en una imagen del portaobjetos	95
Creación de una región de interés rápida.	98
Exclusión de un área de la región de interés	99
Creación y modificación de un cuadro de texto en la imagen del portaobjetos.	101

Creación y personalización de anotaciones de texto	103
Creación y edición de una anotación de flecha	106
Añadir una medición a una región de interés o tejido	108
Análisis de las imágenes del portaobjetos	110
Acerca de las herramientas de análisis y la región de interés	111
Análisis automático de una región de interés	112
Introducción de un análisis manual	116
Utilización de herramientas de análisis	117
Aumento de imágenes del portaobjetos	118
Visualización de un nivel de enfoque para los portaobjetos escaneados	120
Seguimiento de la visualización del portaobjetos	121
Registro de portaobjetos	124
Visualización de portaobjetos en tándem	125
Visualización de portaobjetos por separado	127
Rotación de las imágenes del portaobjetos	129
Calibración del color del portaobjetos	131
Aplicación de una calibración de color predeterminada a un portaobjetos	133
Exportación de la imagen del portaobjetos o de una anotación	134
Consultas en los casos	136
Reasignación de un caso	136
Compartir un caso	138
Solicitud de una segunda opinión	140
Cancelación de una solicitud de segunda opinión	142
Aceptación y rechazo de una solicitud de segunda opinión	143
Producción y cierre de un informe	145
Adjuntar informes e imágenes externos a un caso	145
Apertura y visualización de archivos adjuntos	147
Modificación de archivos adjuntos existentes	148
Finalización de un caso	149
Acerca de la conclusión de un caso	150
Acerca de las plantillas de informe	151
Selección de una plantilla de informe y revisión	152
Creación y edición de comentarios predefinidos	154
Eliminación de comentarios predefinidos	155
Adición de comentarios predefinidos a un informe	156
Revisar o editar la información de configuración de la tinción	157
Cierre del informe	158
Conservación de las imágenes	160

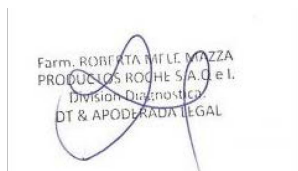

Descripción general de las pantallas casos e imagen para los patólogos	161
Descripción general de la pantalla CASES	161
Acerca de la asignación de casos	161
Acerca de los indicadores del estado del caso	163
Descripción general de la pantalla VIEWER	164
Acerca de la visualización de las imágenes del portaobjetos y de la información del paciente	164
Acerca de la visualización de portaobjetos...	167
Acerca de los paneles del visor	170
Acerca del movimiento por las imágenes de los portaobjetos y los paneles	171
Acerca de los paneles SLIDE NAVIGATOR y ALL SLIDES	172
Visión general de la anotación en el SLIDE PANEL y de las herramientas de análisis	174
Acerca de los paneles CASE LOG, PATIENT HISTORY, NOTES, THUMBNAIL y SLIDE INFO	178
Descripción general de la anotación y el análisis de imágenes	180
Descripción general de la pantalla REPORT	182
Acerca de la generación y el cierre de un informe	183
Acerca de la conservación de las imágenes..	183

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Administración de casos

Contenidos de esta sección

Acerca de los permisos del patólogo del centro y cliente (67)

Acerca de la información del caso (68)

Visualización de la lista de casos (69)

Anulación de un caso (71)

Reapertura de un caso (72)

Creación de un suplemento para añadir una solicitud de portaobjetos (73)

Enmienda de la información de un caso cerrado (74)

Corrección de un informe (76)

Acerca de los permisos del patólogo del centro y cliente

Los permisos del patólogo dependen de la relación que tenga con el caso y de cómo haya configurado el administrador la función de compartir el caso.

El administrador establece permisos para ver, modificar o analizar los casos para cada centro y cliente. El permiso controla cómo se puede compartir un caso de un centro o cliente.

La tabla describe los permisos para compartir los casos.

Permisos para compartir el caso	Ajustes de administrador
<ul style="list-style-type: none"> Compartir los casos con otros patólogos en cualquier centro Solicitar una segunda opinión de un patólogos cliente (que no estén asociados a un centro) o especialistas Cambiar la prioridad del caso (cancelar, elevar a urgente o reabrir un caso cerrado) 	<p>A los patólogos del centro se les podrán asignar automáticamente permisos parciales o completos para compartir para todos los casos de su centro y de otros.</p> <p>A los patólogos clientes se les podrán asignar automáticamente permisos parciales o completos para compartir para todos los casos de los clientes.</p>


☒ Permisos para compartir los casos del patólogo del centro y cliente

Temas relacionados

- Acerca del marcado y etiquetado de casos (39)
- Acerca de la información del caso (68)
- Acerca de la asignación de casos (161)
- Descripción general de la pantalla VIEWER (164)
- Acerca de la generación y el cierre de un informe (183)

Acerca de la información del caso

La siguiente imagen muestra los elementos principales de la pantalla **CASES**.

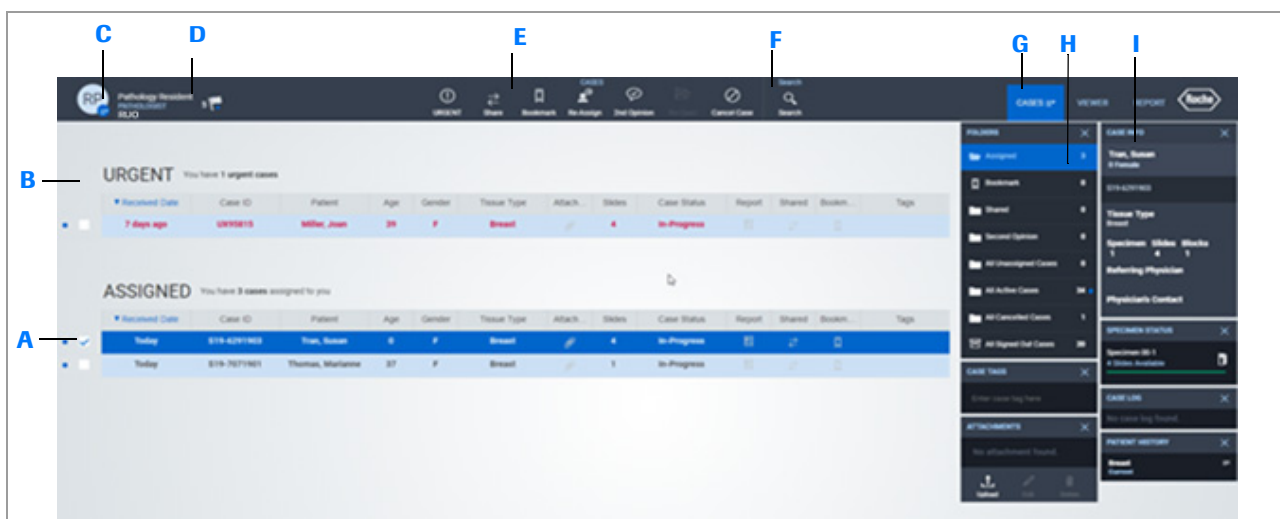

- A** Área principal de visualización con los casos asignados y la información proporcionada por el histotécnico o el administrador.
- B** Área de visualización para los casos con estado **URGENT**.
- C** Seleccione el botón del menú **User Settings** para buscar las opciones disponibles para identificar a los pacientes y desidentificarlos, configurar uPath software, acceder a la Asistencia al usuario, obtener información sobre el producto (About) y cerrar la sesión.
- D** Vista de notificaciones de casos nuevos o acciones requeridas para los casos ya existentes.
- E** Gestione el estado del caso para colaborar, reasignar o cambiar la prioridad del caso.
- F** Busque o muestre un caso concreto.
- G** Muestre u oculte los paneles **CASE** con detalles de un caso, un paciente o una muestra.
- H** Vea los casos organizados por **FOLDERS**, marque los casos o etiquételos para recuperarlos y añada archivos adjuntos a un caso.
- I** Vea información adicional del paciente o de la muestra en los paneles **CASE INFO**, **SPECIMEN STATUS**, **CASE LOG** y **PATIENT HISTORY**.

Farm. ROBERTA INFLE. MAZZA
 PRODUCOS ROCHE S.A. C.e.L.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

Visualización de la lista de casos

Cuando abre la pantalla **CASES**, se muestran las opciones predeterminadas que había seleccionado en el inicio de sesión anterior.

La pantalla **CASES** le permite gestionar la información del caso y las notificaciones, además de colaborar con otros patólogos.



La categoría de la lista de casos que se visualice sigue vigente hasta que la cambie.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en su cuenta y la pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para abrir las listas de casos

- 1 Seleccione **CASES > FOLDERS**.
 - Aparecerá una marca de verificación al lado del panel **FOLDERS** que indica que el panel está abierto.
- 2 Elija una de las siguientes opciones de carpeta para mostrar la lista de casos correspondiente:
 - **Assigned**
 - **Bookmark**
 - **Shared**
 - **Second Opinion**
 - **All Unassigned Cases**
 - **All Active Cases**
 - **All Cancelled Cases**
 - **All Signed Out Cases**
- 3 Revise la información del caso en la lista de casos abierta o en la información detallada según sea necesario.
 - Sitúe el cursor del ratón sobre una entrada de la lista para ver la entrada completa en caso de que esté acortada.
- 4 Si lo desea, personalice la lista de casos mostrada.
- 5 Seleccione el botón **Search** para localizar un caso concreto que no encuentre en la lista mostrada.

Case ID	▼ Patient	Age
2376	Nagle, John	
2376	Nagle, Jo...	77

Temas relacionados

- Apertura y visualización de los paneles en la lista CASES (50)
- Asignación del estado URGENT a un caso (200)

Desidentificación e identificación de pacientes

Para proteger la información sobre la salud del paciente (PHI), es posible eliminar la identificación de datos del paciente en los casos. También puede volver a los valores predeterminados de identificación de los pacientes de los casos.



El estado de identificación de los datos del paciente sigue vigente hasta que la cambie.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Ha iniciado sesión en su cuenta y la pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

Para desidentificar e identificar a los pacientes

1 Seleccione **VIEWER > User Settings > De-identify Patient**.

- Los ID de caso y los nombres de paciente de sus casos se remplazan con varias letras X para desidentificar a los pacientes.

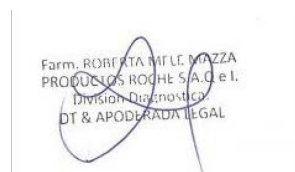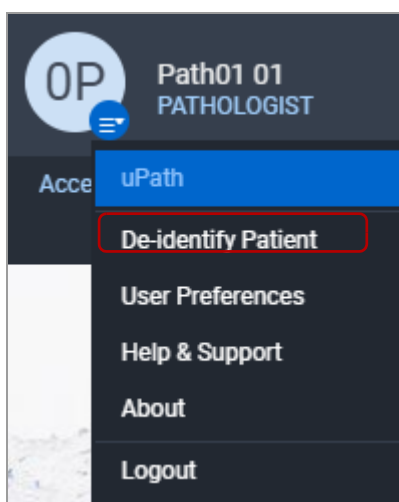

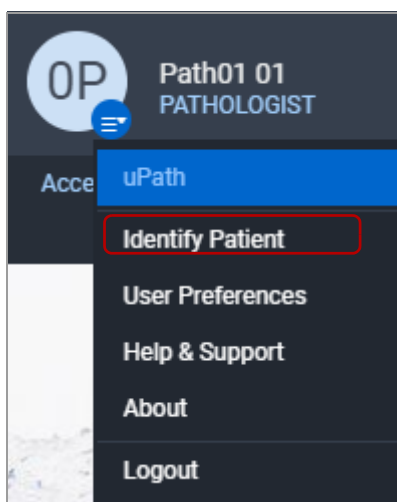


- 2 Si los casos que necesita no cuentan con información identificable del paciente, seleccione **VIEWER > User Settings > Identify Patient**.
 - Los ID de los casos y los nombres de paciente vuelven a mostrarse en los casos.

Anulación de un caso

Puede anular un caso y eliminarlo de su lista de casos asignados. El caso pasará de la lista **ASSIGNED** a la lista **ALL CANCELED CASES**.

 La cancelación del caso desde el LIS no se mostrará como una notificación nueva. Compruebe la carpeta **ALL CANCELLED CASES** para buscar los casos que ha cancelado.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

URGENT <small>You have 0 urgent cases</small>					
Received ...	Case ID	Patient	Age	Gender	
ASSIGNED <small>You have 6 cases assigned to you</small>					
Received ...	Case ID	Patient	Age	Gender	
<input type="checkbox"/>	20-03-201...	delete pat...	Searly, Ja...	0	M
<input type="checkbox"/>	Yesterday	12901	Eaton, Ja...	74	F
<input type="checkbox"/>	19-03-201...	12458	Searly, Ja...	0	M
<input type="checkbox"/>	19-03-201...	12456	Cox, Hillary	47	F
<input checked="" type="checkbox"/>	6 days ago	12370	O'hara, Bri...	37	F
<input type="checkbox"/>	6 days ago	12369	O'hara, Bri...	37	F

Case ID	Patient Name	Age/Gender	Primary Tissue
2476	Searly, James	0/M	Bladder

Reason *

► Para anular un caso

- 1 Seleccione **FOLDERS > Assigned**.
- 2 En la lista de casos asignados, seleccione el caso que desee anular.
- 3 En la sección **CASES** de la barra de menú Quick Action, seleccione el botón **Cancel Case**.

→ Se muestra el cuadro de diálogo **Cancel Case**.

- 4 En el campo **Reason**, introduzca una razón para anular el caso.
 - ❶ Este campo es obligatorio para anular el caso.
- 5 Seleccione **OK > Yes**.
 - El caso pasa de la lista **ASSIGNED** a las listas de casos **CANCELLED (by me)** y **ALL CANCELLED**.

📖 Temas relacionados

- Asignación del estado URGENT a un caso (200)

Reapertura de un caso



Si necesita cambiar la información de un caso o generar un informe, puede reabrirlo. Los casos pueden abrirse para añadir correcciones, suplementos o enmiendas.

Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

Farm. ROBERTA MFLI. MOZZA
 PRODUCI. LOS ROCHE S.A. S.r.l.
 Divisione Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

► Para reabrir un caso cerrado

- 1 Seleccione **FOLDERS > All Signed Out Cases**.
- 2 En la lista de casos **MY SIGNED OUT**, seleccione el caso que desea reabrir.
- 3 En la barra de menú Quick Action, seleccione el botón **Re-Open**.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **Reopen Case**.

MY SIGNED OUT <small>You have signed out 4 cases</small>					
▼ Sign Out Date	Case ID	Patient	Age	Gend	
Today	S19-7723119	Tullison, James	41	M	
Today	S18-12122818	Murphy, Siobian	42	F	
Today	S19-6062519	Jonson, Candice	79	F	
07/26/2019	S19-62719	Tran, Susan	38	F	

ALL SIGNED OUT <small>There are total 4 Signed Out cases</small>					
▼ Signed out Date	Case ID	Patient	Age	Gender	
Today	S19-7723119	Tullison, James	41	M	
Today	S18-12122818	Murphy, Siobian	42	F	
Today	S19-6062519	Jonson, Candice	79	F	
07/26/2019	S19-62719	Tran, Susan	38	F	

Reopen Case

Case ID: 12371 Patient: Seary, James Age/Gender: 0/M Primary Tissue: Breast

Addendum
 Amendment
 Correction

Notes

CANCEL OK

- 4 Seleccione las modificaciones que desee realizar en el caso: **Addendum**, **Amendment** o **Correction**.
- 5 Introduzca una nota opcional.
- 6 Seleccione **OK** para guardar el motivo de la reapertura del caso.

📖 Temas relacionados

- Creación de un suplemento para añadir una solicitud de portaobjetos (73)
- Enmienda de la información de un caso cerrado (74)
- Corrección de un informe (76)
- Acerca de la conclusión de un caso (150)

Creación de un suplemento para añadir una solicitud de portaobjetos

Puede añadir una solicitud de portaobjetos a un caso cerrado.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para procesar un suplemento de un caso cerrado

- 1 Seleccione **FOLDERS > All Signed Out Cases** y escoja el caso que desea consultar. Seleccione el botón **Re-Open**.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **Reopen case**.
- 2 Seleccione **Addendum > NEXT**.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **New Slide Request**.
- 3 En el cuadro de diálogo **New Slide Request**, haga lo siguiente:
 - **Specimen***: seleccione una muestra.
 - **Staining Type***: seleccione un biomarcador.
 - (opcional) **Request Notes**: introduzca un comentario si desea que se incluyan notas en los resultados.
- 4 Seleccione el botón **SUBMIT**.
→ El caso pasa de la lista **SIGNED OUT** a la lista **ASSIGNED**.
→ La solicitud del portaobjetos se envía al histotécnico que realiza la función de gestión de datos.


💡 En función de cómo haya configurado sus **User Preferences > Notifications**, puede recibir una notificación cuando el nuevo portaobjetos esté disponible para analizar.

📖 Temas relacionados

- Reapertura de un caso (72)
- Descripción general de la pantalla VIEWER (164)
- Cierre del informe (158)

Enmienda de la información de un caso cerrado

Puede reabrir un caso, añadir o editar información y, después, acceder a la vista previa del informe y cerrarlo.

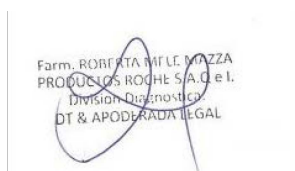

Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► **Para procesar una enmienda de un caso cerrado**

- 1 Seleccione **FOLDERS > All Signed Out Cases** y escoja el caso que desea reabrir. Seleccione el botón **Re-Open**.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **Reopen case**.
- 2 Seleccione **Amendment > OK**.
→ Se muestra la pantalla **REPORT**.

- 3 En el campo **Amendment Notes**, introduzca una razón para modificar el caso.
- 4 En la barra de menú Quick Action, seleccione el botón **Preview & Sign-Out**.
→ Se muestra una previsualización del informe marcada como AMENDMENT en la esquina superior derecha.
- 5 En el cuadro de diálogo **Preview & Sign-Out**, haga lo siguiente:
 - (opcional) **Print**: seleccione imprimir el informe.
 - (opcional) **Download PDF**: seleccione descargar el informe en PDF.
 - **SIGN-OUT OF CASE**: seleccione cerrar el caso.
- 6 Seleccione **OK** para salir del caso.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **Sign Out of Case**.
- 7 (Opcional) Introduzca un comentario.
- 8 Seleccione **SIGN OUT**.
→ El caso pasa de la lista ASSIGNED a la lista ALL SIGNED OUT CASES.
→ Se mostrará la lista ALL SIGNED OUT CASES.

Corrección de un informe

Temas relacionados

- Reapertura de un caso (72)
- Descripción general de la pantalla VIEWER (164)
- Cierre del informe (158)

Corrección de un informe

Puede corregir un informe, previsualizar los cambios y cerrarlo. También puede reabrir un caso para corregir un informe.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

Para procesar una corrección de un caso cerrado

- 1 Seleccione **FOLDERS > All Signed Out Cases** y escoja el caso que desea reabrir. Seleccione el botón **Re-Open**.
 - Se muestra el cuadro de diálogo **Reopen case**.
- 2 Seleccione **Correction > OK**.
 - Se muestra la pantalla **REPORT**.

- 3 En el campo **Correction Notes**, introduzca una descripción de la corrección.

Farm. ROBERTA MARLE MOZZA
 PRODUTOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

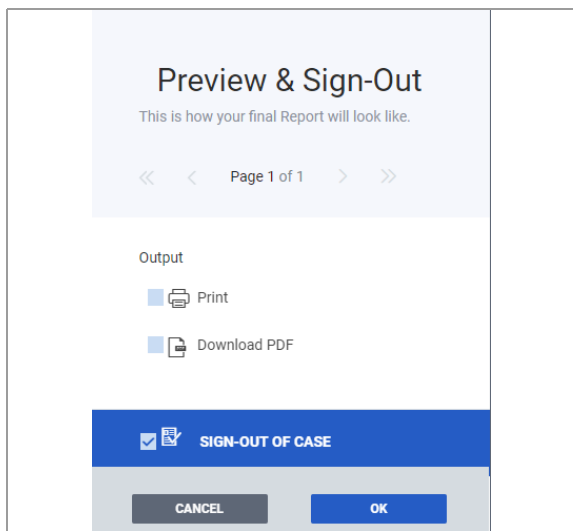

4 En la barra de menú Quick Action, seleccione el botón **Preview & Sign-Out**.

→ Se muestra una vista previa del informe, marcada como **CORRECTION** en la esquina superior derecha.

5 En el cuadro de diálogo **Preview & Sign-Out**, haga lo siguiente:

- (opcional) **Print**: seleccione imprimir el informe.
- (opcional) **Download PDF**: seleccione descargar el informe en PDF.
- **SIGN-OUT OF CASE**: seleccione cerrar el caso.

6 Seleccione **OK** para salir del caso.

→ Se muestra el cuadro de diálogo **Sign Out of Case**.

7 (Opcional) Introduzca un comentario.

8 Seleccione **SIGN OUT**.

→ El caso pasa de la lista Assigned a la lista **ALL SIGNED OUT CASES**.

→ Se mostrará la lista **ALL SIGNED OUT CASES**.

Temas relacionados

- Reapertura de un caso (72)
- Descripción general de la pantalla VIEWER (164)
- Cierre del informe (158)


Visualización y análisis de portaobjetos

Contenidos de esta sección

- Apertura y cierre de los paneles del visor (78)
- Consulta de la información sobre portaobjetos (80)
- Consulta de una nota en el panel NOTES (81)
- Adición de una nota a la imagen del portaobjetos o al caso (82)
- Agregar información de la configuración de la tinción (83)
- Solicitud de volver a escanear un portaobjetos (85)
- Revisión y cualificación de los portaobjetos (86)
- Creación y modificación de una región de interés (93)
- Análisis de las imágenes del portaobjetos (110)
- Utilización de herramientas de análisis (117)
- Exportación de la imagen del portaobjetos o de una anotación (134)

Apertura y cierre de los paneles del visor

Los paneles del visor se pueden abrir y cerrar según sea necesario.

 Los paneles del visor que se seleccionan en las preferencias del usuario para que se muestren están abiertos en todos los casos. Si se abren paneles adicionales o se cierran, el cambio que se ha realizado en los ajustes únicamente se aplica al caso concreto que se está consultando. Al pasar a otro caso, se vuelven a aplicar los ajustes predeterminados.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta en el caso seleccionado.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.



Farm. ROBERTA NELLE MAZZA
PRODUC. LOS ROCHE S.A. G e I.
Divisione Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

CASES	VIEWER ⇅	REPORT
✓	Slide Navigator	Alt+F1
✓	All Slides	Alt+F2
	Slide Panel	Alt+F3
✓	Zoom	Alt+F5
✓	Rotate	Alt+F6
✓	Notes	Alt+F7
✓	Case Log	Alt+F8
	Focus Level	Alt+F9
	Slide Tracking	Alt+F10
	Color Legend	Alt+F11
✓	Patient History	Alt+F12
	Thumbnail	F8
	Slide Info	F9

► Para abrir los paneles del visor

1 En la pestaña **VIEWER**, pase el ratón por encima del icono de la lista desplegable para poder consultar la lista de paneles del visor y elija entre las opciones disponibles el que quiere que se muestre.

❶ Los elementos atenuados de la lista desplegable son paneles del visor que no están disponibles en ese momento.

→ Los paneles del visor seleccionados se muestran en la parte derecha del área principal de visualización del caso que ha seleccionado.

💡 Puede que la visualización de algunos paneles no esté disponible hasta que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, debe:

- Seleccionar un portaobjetos para acceder a los paneles **SLIDE NAVIGATOR** y **FOCUS LEVEL**.
- Seleccionar una ampliación del portaobjetos en el panel **ZOOM** para acceder al **SLIDE PANEL**, al panel **THUMBNAIL** y al panel **SLIDE INFO**.
- Crear una ROI para utilizar las funciones del **SLIDE PANEL**.
- Analizar una ROI para acceder a la **COLOR LEGEND**.

2 Coloque el cursor del ratón fuera de la lista para que pueda cerrarse.

► Para cerrar los paneles del visor

1 Para cerrar un panel del visor, seleccione el botón **X** en la esquina superior derecha del panel.

❶ También es posible quitar la selección del panel en la pestaña **VIEWER** borrando la marca de verificación que aparece a su lado.

2 Para cerrar todos los paneles abiertos, seleccione el botón **Hide Panels** en las herramientas **VIEW** del menú Quick Action.


❶ Para volver a abrir los paneles del visor ocultos, seleccione el botón **Show Panels** de las herramientas **VIEW** del menú Quick Action.

📖 Temas relacionados

- Configuración de los paneles del visor (46)

Consulta de la información sobre portaobjetos

Puede consultar el panel **THUMBNAIL** para obtener una visión general de las imágenes de portaobjetos asociadas con el caso. Los metadatos relacionados con la imagen de un portaobjetos están disponibles en el panel **SLIDE INFO**.

 No utilice las flechas de su navegador para navegar entre las pantallas. Hágalo mediante las pestañas **CASES**, **VIEWER** y **REPORT**. También puede elegir la opción **uPath** de la lista desplegable **User Settings** para volver a la pantalla **CASES**.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta en el caso seleccionado.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para ver la miniatura y la información del portaobjetos

- 1 Seleccione **VIEWER > THUMBNAIL**.
 - Se muestra la imagen en miniatura del portaobjetos tal y como la ha producido el escáner.
 - Se habilita el botón **CAPTURE INFO** situado debajo de la imagen en miniatura.



Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 Division Diagnostico
 DT & APODERADA LEGAL

SLIDE INFO	
Slide Label	S20-152-458-67 00-10-00-1
Slide annotation	
Case ID	S20-152-458-67
Specimen ID	00-1
Patient(Gender)	Jones, Sally , (Female)
Age(DOB)	70 years old, 01/01/1950
Marker	PD-L1 (SP263) NSCLC RUO
Tissue Type	Lung

- 2 Seleccione el botón **CAPTURE INFO** para ver los metadatos de la imagen del portaobjetos.
→ Se muestra el panel **SLIDE INFO**.

SLIDE INFO	
Tissue Type	Breast
Control Type	None
Slide Status	In Progress
User Name	Operator
Workflow	Integrated View (Treating MD)
Scanner Model	VENTANA DP 200
Build version	1.0.0.15101
Unit number (call it unit serial number)	2000013
Build Date	1/17/2018 07:11

- 3 Desplácese por el panel **SLIDE INFO** para mostrar toda la información asociada al portaobjetos.

Temas relacionados

- Adición de una nota a la imagen del portaobjetos o al caso (82)

Consulta de una nota en el panel NOTES

Puede consultar las notas de los casos y los portaobjetos.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta en el caso seleccionado.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para ver una nota

- 1 Seleccione **VIEWER > NOTES**.
- 2 Para consultar una nota, realice una de las operaciones siguientes:
 - Seleccione el botón **CASE** para ver las notas del caso.
 - Seleccione un portaobjetos y, a continuación, seleccione el botón **SLIDE** para ver las notas del portaobjetos.

Adición de una nota a la imagen del portaobjetos o al caso

Puede añadir una nota de texto a una imagen del portaobjetos o al caso, que se podrá consultar en la pantalla **VIEWER**.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta en el caso seleccionado.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para añadir una nota al caso o al portaobjetos

- 1 Seleccione **VIEWER > NOTES** y, a continuación, el botón **CASE** o **SLIDE**, en función de la ubicación en la que quiera añadir la nota.
- 2 En el panel **NOTES**, siga estos pasos:
 - Introduzca el texto en el campo de notas y, a continuación, haga clic fuera de este campo para guardarla.
 - Debajo de los botones **CASE** y **SLIDE**, aparece durante unos segundos «Saving» y, a continuación, se indica «Saved» en una fuente de color verde.

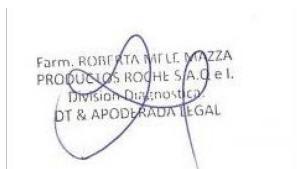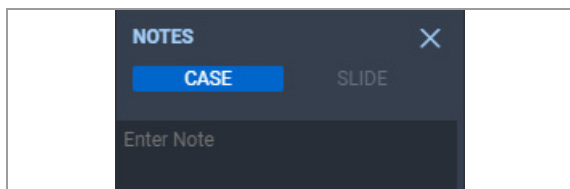

► Temas relacionados

- Consulta de la información sobre portaobjetos (80)
- Revisión y edición de portaobjetos (87)

Agregar información de la configuración de la tinción

Contenidos de esta sección

Acerca de la configuración de la tinción (83)
Introducir la información de configuración de la tinción (83)

Acerca de la configuración de la tinción

Las evaluaciones de calidad de la tinción se realizan antes de la revisión de los portaobjetos para su análisis.

Los patólogos utilizan la pantalla **VIEWER** para introducir la información de la configuración de la tinción de los portaobjetos relativos a un caso.

Acceda a la pantalla **VIEWER** a partir de uno de los siguientes métodos:

- Seleccione la casilla de verificación situada al lado de un caso y, luego, seleccione **VIEWER**.
- Seleccione la fila del caso que quiere consultar (la fila se volverá de color azul) y, a continuación, seleccione la pestaña **VIEWER**.
- Haga doble clic en cualquiera de los puntos de la fila de un caso y se abrirá la pantalla **VIEWER** de forma automática.



Introducir la información de configuración de la tinción

Puede introducir la información de la configuración de la tinción para cada portaobjetos. La información que ha solicitado en el cuadro de diálogo **Stain Setup** depende del algoritmo de análisis de la imagen del portaobjetos.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta en el caso seleccionado.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.
- Los portaobjetos de los casos están disponibles para el patólogo.

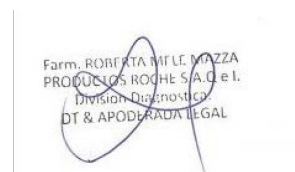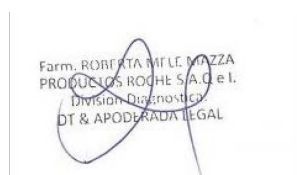

► Para completar la información de configuración de la tinción

- 1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, seleccione el botón **Stain Setup** del menú Quick Action.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **Stain Setup**.
- 2 En la sección **Slides**, seleccione el portaobjetos que requiera información de configuración de la tinción.
- 3 Introduzca un valor en **Time to Fixation** y **Duration of Fixation** (en horas).
- 4 En la lista desplegable **Fixative**, seleccione el fijador.
- 5 En el campo **Uniform Staining**, seleccione la opción Present o Absent para documentar si el portaobjetos se ha teñido con uniformidad.
- 6 Verifique que el apartado **Sample adequate for Analysis** está marcado como **Yes**.
 - ❶ Esta opción está seleccionada por defecto.
- 7 Rellene todos los campos adicionales que se le solicite, como la intensidad de la tinción, la tinción de membrana completa, las condiciones del ensayo estándar cumplidas u homogéneo; oscuro; patrón circunferencial.
 - ❶ Los campos adicionales varían en función del algoritmo que se haya seleccionado para el análisis del portaobjetos.
- 8 Revise los campos de resultados **Control Results** y **Disclaimer**.
 - ❶ Esta información la ha proporcionado el administrador y es específica para la prueba o el análisis concreto.
- 9 Seleccione el botón **SAVE**.
 - ❶ Repita este procedimiento para todos los portaobjetos adicionales del caso que requieran de información de configuración de la tinción.

Solicitud de volver a escanear un portaobjetos

Puede solicitar que se vuelva a escanear un portaobjetos.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para solicitar un portaobjetos

- 1 Seleccione el botón **Request**.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **Staining Request**.

The screenshot shows the 'Staining Request' dialog box. At the top, there are fields for Case ID, Patient, Age/Gender, and Primary Tissue. Below these are two dropdown menus: 'Specimen *' (highlighted with a red box) and 'Staining Type *'. The 'Specimen *' dropdown shows 'Specimen 00-1'. Below the dropdowns is a 'Comments' section with a text area and the prompt 'Enter your comment here'. At the bottom are 'CANCEL' and 'DONE' buttons.


- 2 En la lista desplegable **Specimen**, seleccione el muestra que le interese.
 - ❶ La muestra predeterminada es la primera de la lista, siguiendo el orden alfanumérico.

The screenshot shows the 'Staining Type *' dropdown menu open. The menu items are: Choose, H&E, ER, PR, KI-67, and P53.

- 3 En la lista desplegable **Staining Type**, seleccione el biomarcador.

The screenshot shows the 'Staining Request' dialog box. The 'Specimen *' and 'Staining Type *' dropdowns are now closed. The 'Comments' text area is highlighted with a red box. The 'DONE' button is visible at the bottom right.

- 4 (Opcional) En el campo **Comments**, introduzca un comentario.
- 5 Seleccione el botón **DONE** para completar la solicitud.
 - La solicitud aparecerá en la lista de solicitudes del histotécnico.
 - En el área de imagen del portaobjetos de la pantalla **VIEWER**, se muestra una plantilla de portaobjetos con el texto "STAINING" y la tinción solicitada en la etiqueta del portaobjetos.
 - La solicitud de portaobjetos se añade al **CASE LOG**.

 No puede cerrar el caso hasta que complete la solicitud y visualice el portaobjetos.

Revisión y cualificación de los portaobjetos

Contenidos de esta sección

Acerca de la cualificación de los portaobjetos (86)

Acerca de la repetición del escaneado de un portaobjetos (87)

Revisión y edición de portaobjetos (87)


Repetición del escaneado de un portaobjetos (89)

Exclusión de un portaobjetos (90)

Acerca de la cualificación de los portaobjetos

Puede acceder a la información de configuración de la tinción y editarla. Antes de cerrar el caso debe examinar todos los portaobjetos proporcionados.

Un portaobjetos que cumpla los criterios de evaluación de calidad, tal y como se verifica en la información de configuración de la tinción, podría considerarse inadecuado para la evaluación. Usted o el histotécnico pueden volver a escanear el portaobjetos y omitirlo del análisis o solicitar un portaobjetos de sustitución.

 Los histotécnicos evalúan la calidad de la tinción en cada portaobjetos antes de asociarlo con el caso, e introducen los parámetros de tinción y la información de cualificación.



Farm. ROBFATA M.FLE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. Q.e.L.
 División Diagnóstica
 DT & APODERADA LEGAL

Acerca de la repetición del escaneado de un portaobjetos

La información que revise en la configuración de la tinción puede ayudarle a evaluar un portaobjetos o a proporcionar una justificación para volver a escanearlo.

Si usted o un histotécnico vuelven a escanear un portaobjetos, no podrán incluirlo en su análisis más adelante. Se puede volver a escanear un portaobjetos antes o después del análisis.

Al volver a escanear un portaobjetos, se solicita automáticamente al histotécnico una repetición de escaneado o que proporcione un portaobjetos nuevo, en función de la razón por la que haya decidido repetir el escaneado. A continuación, tiene las siguientes opciones para continuar con el caso:

- Espere a que le envíen la repetición del escaneado o el portaobjetos nuevo. Antes de cerrar el caso, debe examinar y analizar (si corresponde) la imagen de sustitución.
- Excluya el portaobjetos que ha vuelto a escanear y cierre el caso en función de los portaobjetos aceptables ya examinados. Al excluir el portaobjetos, se retira automáticamente de la lista de solicitudes del histotécnico.

Revisión y edición de portaobjetos

Puede revisar la información de configuración del portaobjetos y realizar cambios en la evaluación de calidad de la tinción.

Se pueden volver a escanear los portaobjetos en cualquier momento después de su visualización o análisis. Es necesario proporcionar una razón para llevar a cabo la repetición del escaneado del portaobjetos.

Antes de cerrar el caso se pueden solicitar portaobjetos de sustitución o adicionales.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para revisar y editar la evaluación de calidad de la tinción

1 Seleccione un portaobjetos teñido con información de configuración de la tinción y aumente el portaobjetos.
→ Se habilitará el botón **Stain Setup** de la barra de menú Quick Action.

2 Seleccione el botón **Stain Setup**.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **Stain Setup**.

3 En el panel **Slides**, seleccione el portaobjetos que desee revisar.

4 Revise los siguientes campos y edítelos si es necesario:

- **Time to Fixation** (en horas)
- **Duration of Fixation** (en horas)
- **Sample adequate for Analysis**
- **Fixative** (lista desplegable)
- **Staining Intensity** (este campo puede variar)
- **Uniform Staining** (Present or Absent)
- **Standard assay conditions met**
- **Disclaimer** <prueba>
- **Control results** <prueba>


❶ La mayoría de los campos incluyen entradas hechas por el histotécnico. **Disclaimer** y **Control results** también pueden ser proporcionadas por el administrador y son campos opcionales.

5 Seleccione el botón **SAVE**.

- En caso de que no introduzca ningún cambio, el botón **SAVE** no estará disponible. Seleccione **CANCEL** para volver a la pantalla **VIEWER**.

📖 Temas relacionados

- Consulta de la información sobre portaobjetos (80)
- Repetición del escaneado de un portaobjetos (89)
- Exclusión de un portaobjetos (90)
- Solicitud de volver a escanear un portaobjetos (85)

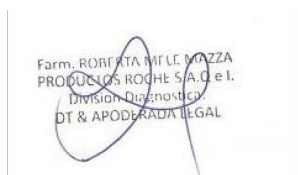

Repetición del escaneado de un portaobjetos

Puede volver a escanear un portaobjetos si no cumple los criterios de evaluación de calidad.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo o de histotécnico y los permisos correctos.

► Para volver a escanear un portaobjetos

- 1 Seleccione el portaobjetos que desea volver a escanear y, a continuación, amplíelo.
 - Se habilitará el botón **Rescan** de la barra de menú Quick Action.
- 2 Seleccione el botón **Rescan**.
 - Se muestra el cuadro de diálogo **Rescan Slide**.
- 3 Verifique la información del portaobjetos antes de continuar.
 - ❗ Una vez se ha vuelto a escanear el portaobjetos, no se puede deshacer la acción.
- 4 Seleccione la razón por la que desea repetir el escaneado del portaobjetos en el menú desplegable **Rescan Reason**.

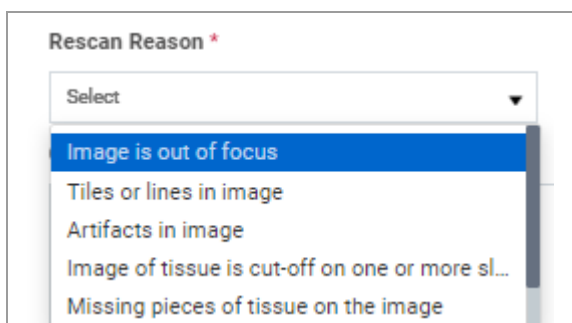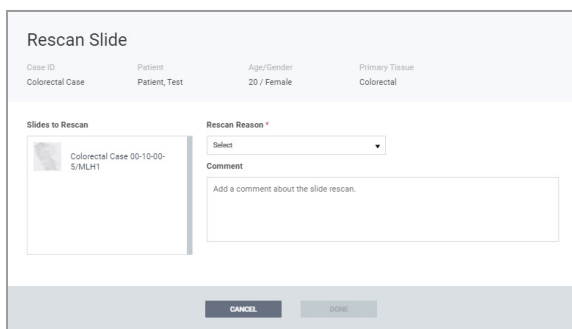


Rejection Reason *

Image is out of focus

Comment

Add a comment regarding the slide rejection

CANCEL DONE

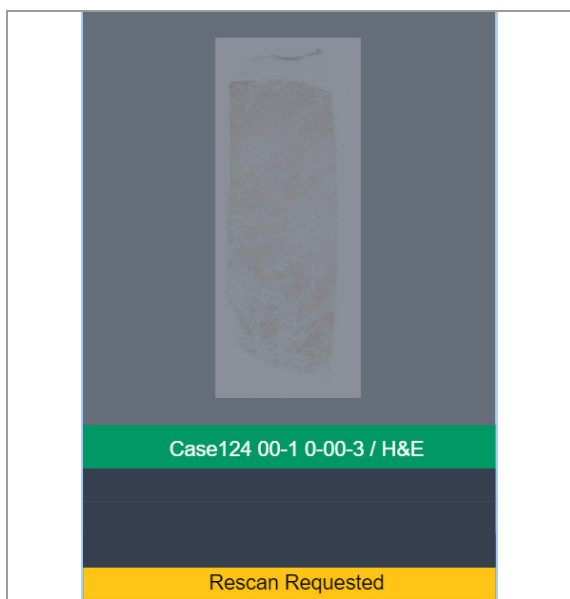

5 Introduzca un comentario con información adicional sobre su decisión de volver a escanear el portaobjetos.

- 1 Debe introducir un comentario en el campo **Rescan Reason** con el motivo que ha facilitado para que se envíe el histotécnico. El comentario facilitará información al histotécnico sobre las deficiencias del portaobjetos.

Si selecciona la opción «Other» como motivo para la repetición del escaneado del portaobjetos, será obligatorio introducir un comentario.

6 Seleccione el botón **DONE** para continuar y, a continuación, seleccione **Yes** en la notificación en banner azul.

- El portaobjetos queda atenuado y en su etiqueta figura una marca amarilla con el texto «Rescan Requested».
- El histotécnico recibirá automáticamente una solicitud de repetición de escaneado o de proporcionar un nuevo portaobjetos, en función de la razón por la que se haya pedido la repetición del escaneado.
- El evento se añade a **CASE LOG** debajo de la imagen de perfil del histotécnico.

Temas relacionados

- Consulta de la información sobre portaobjetos (80)
- Revisión y edición de portaobjetos (87)
- Exclusión de un portaobjetos (90)
- Solicitud de volver a escanear un portaobjetos (85)

Exclusión de un portaobjetos


Puede excluir un portaobjetos que se haya vuelto a escanear de la solicitud de portaobjetos enviada al histotécnico. La opción de exclusión solo está disponible para los portaobjetos que se quieren volver a escanear.

Si está utilizando la versión local de uPath enterprise software (que se encuentra instalada y funciona en el servidor y la infraestructura informática del laboratorio), se puede restablecer la contraseña en **User Preferences**.

Video clip (.mpg, .mp4): upath_rescanslide_excluded.mp4

Title: Exclusión de un portaobjetos con escaneado repetido

- Para excluir un portaobjetos (91)

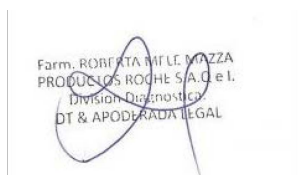





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para excluir un portaobjetos


- 1 Seleccione un portaobjetos que se haya vuelto a escanear y, a continuación, seleccione el botón **Rescan**.
 - Se mostrará un menú desplegable con el botón **Exclude** activo.

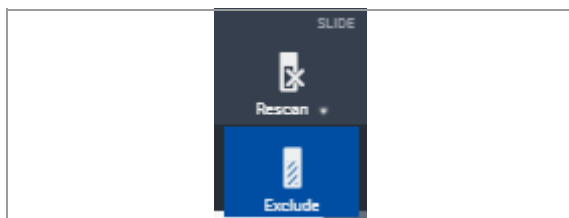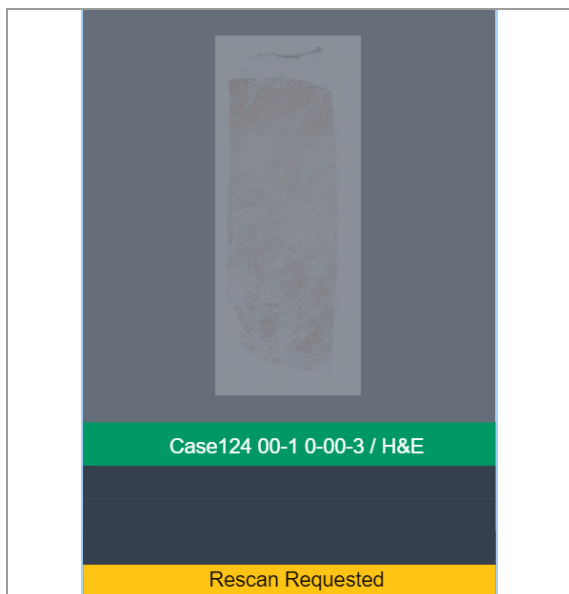

- 2 Seleccione la opción **Exclude**.
 - ❶ El portaobjetos queda excluido y la etiqueta de portaobjetos amarilla pasa de «Rescan Requested» a «Excluded».
 - El botón **Exclude** de la barra del menú Quick Action pasará a ser el menú **Include**. Se cancelará y eliminará cualquier solicitud de portaobjetos de la lista de solicitudes del histotécnico.

💡 Para cerrar un informe, debe excluir cualquier portaobjetos que se haya vuelto a escanear y/o evaluar los portaobjetos de sustitución proporcionados por el histotécnico.

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
 PRODUC. LOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnostico
 DT & APODERADA LEGAL

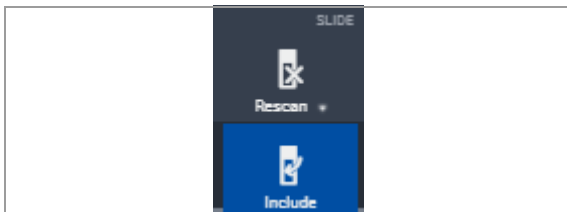

3 Para devolver el portaobjetos al estado de repetición de escaneado solicitada, seleccione el portaobjetos y, a continuación, el botón **Rescan**.


4 Seleccione la opción **Include**.

- ❶ El portaobjetos se vuelve a escanear y la etiqueta de portaobjetos amarilla pasa de «Excluded» a «Rescan Requested».
- La solicitud de portaobjetos asociada con el portaobjetos que se va a volver a escanear volverá a aparecer en la lista de solicitudes del histotécnico.

💡 No podrá cerrar un caso hasta que reciba y analice la repetición del escaneo o el portaobjetos nuevo.

📖 Temas relacionados

- Consulta de la información sobre portaobjetos (80)
- Revisión y edición de portaobjetos (87)
- Repetición del escaneado de un portaobjetos (89)
- Solicitud de volver a escanear un portaobjetos (85)

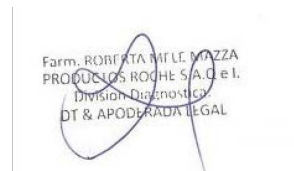

Creación y modificación de una región de interés

Contenidos de esta sección

- Creación de una región de interés en una imagen del portaobjetos (93)
- Edición de una región de interés en una imagen del portaobjetos (95)
- Creación de una región de interés rápida (98)
- Exclusión de un área de la región de interés (99)
- Creación y modificación de un cuadro de texto en la imagen del portaobjetos (101)
- Creación y personalización de anotaciones de texto (103)
- Creación y edición de una anotación de flecha (106)
- Añadir una medición a una región de interés o tejido (108)

Creación de una región de interés en una imagen del portaobjetos

Cada región de interés (ROI) que cree, así como su estado de análisis se mostrarán en el **SLIDE PANEL**. Si comienza a crear una anotación y decide no continuar, puede borrar la selección.






Cree una ROI al evaluar el portaobjetos o para utilizarla en el análisis.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

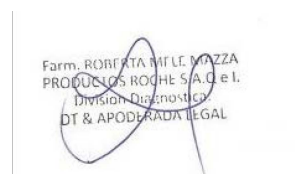

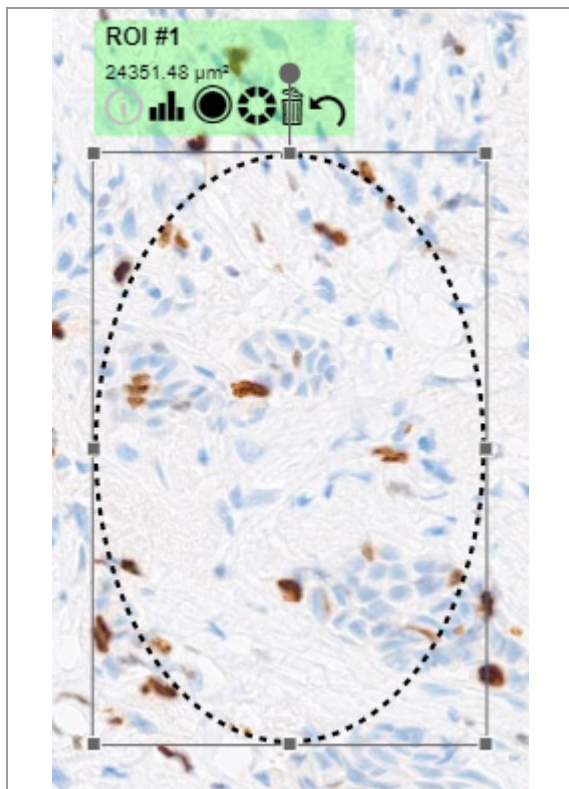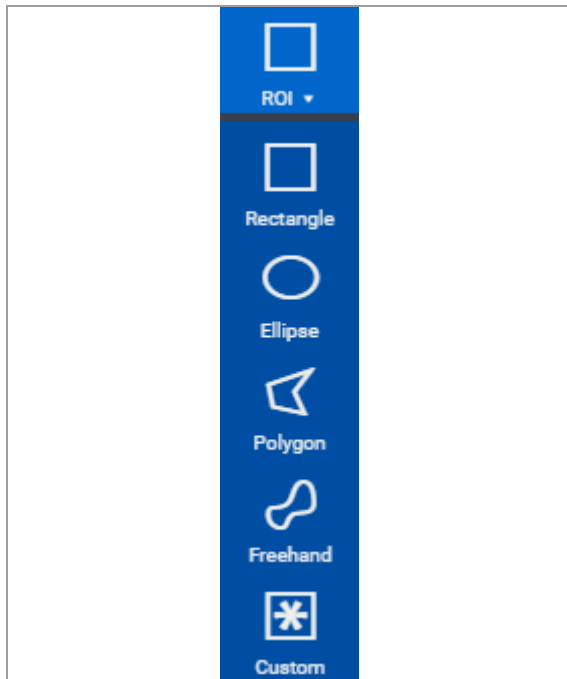

► Para crear una ROI

- 1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, amplíe la imagen.
 - Se habilitarán (se marcarán con una fuente de color blanco brillante) los botones del área **ANNOTATION** de la barra de menú Quick Action.
- 2 Seleccione el botón **ROI** y, a continuación, seleccione la ROI que desea crear.
 - El cursor de mano pasa a ser un cursor en forma de cruz.
 - El botón **ROI** se destacará en azul y el nombre del botón cambiará al tipo de ROI que elija.
- 3 Mueva el cursor sobre el corte de tejido en el que desee crear la ROI y, a continuación, haga clic y arrastre el cursor para producir la ROI.
 - Se crea la ROI y la etiqueta de anotación situada encima de la ROI muestra su nombre y número.

💡 A cada tipo de anotación (exceptuando el cuadro de texto) se le asignará un nombre que incluye un número, como ROI#1 o A#1 para una flecha.

📖 Temas relacionados

- Consulta de la información sobre portaobjetos (80)
- Revisión y edición de portaobjetos (87)
- Edición de una región de interés en una imagen del portaobjetos (95)

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

Edición de una región de interés en una imagen del portaobjetos


Puede cambiar la región de interés (ROI) de una imagen del portaobjetos.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.


► Para editar una ROI

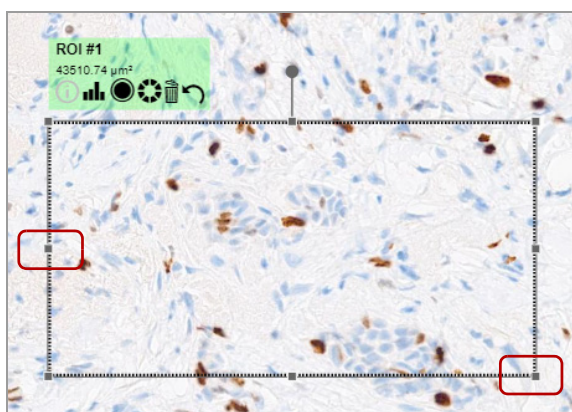

1 Seleccione la ROI.




- Se muestran controladores de tamaño a los lados y en las esquinas de la ROI.
- Aparece la etiqueta emergente de anotación de ROI.

2 Para redimensionar la ROI seleccionada, haga clic en el controlador de tamaño y arrastre hasta la posición deseada.

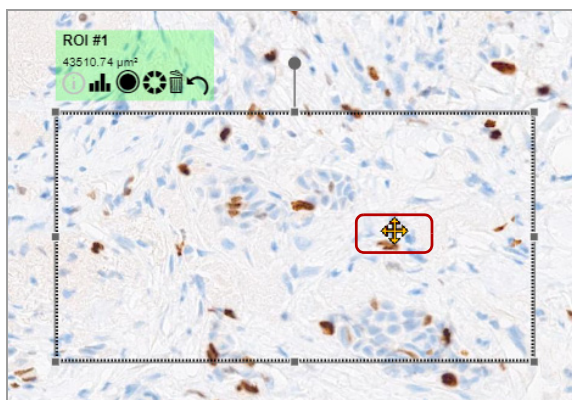

3 Para mover una ROI seleccionada, haga clic en la ROI hasta que cambie a un puntero de movimiento en cuatro direcciones y, a continuación, haga clic en la ROI y arrástrela hasta la posición deseada.

Farm. ROBERTA M.F.L. MOZZA
PRODUCES LOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

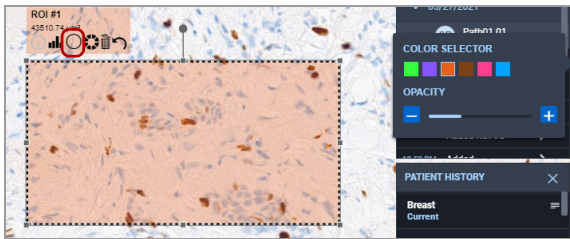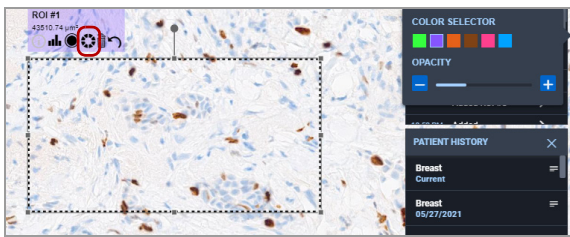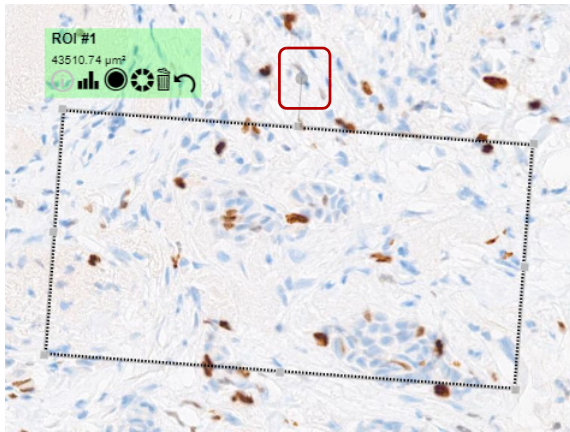


4 Para rotar una ROI seleccionada, haga clic en el controlador de giro hasta que se convierta en un cursor en forma de cruz y, a continuación, arrastre hasta la posición deseada.

5 Para cambiar el color del contorno de la ROI y de la etiqueta de anotación, haga lo siguiente:

- Seleccione el icono de color en la etiqueta emergente de anotación o en el área de funciones **STATUS PANEL**.
- En el panel **COLOR SELECTOR**, seleccione el color para el contorno de ROI y de la etiqueta de anotación.
- Seleccione de nuevo el icono de color para cerrar el panel **COLOR SELECTOR**.


→ El contorno de ROI y de la etiqueta de anotación cambiará al color seleccionado.

 El círculo del contorno está predeterminado.


6 Para añadir un color de relleno a la ROI seleccionada, seleccione el icono sombreado de la etiqueta emergente de anotación o del área de funciones **STATUS PANEL**.

→ Se rellenará la ROI con el mismo color que se utilizó como contorno de la ROI y de la etiqueta de anotación.




→ El icono sombreado se convierte en el icono de contorno.

 Los colores del contorno de la ROI, de relleno y de la etiqueta de anotación deben ser idénticos.

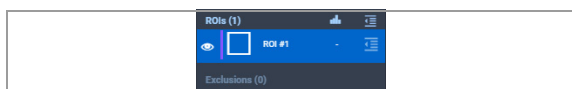Farm. ROBERTA M.L. MOZZA
 PRODUTOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL



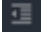


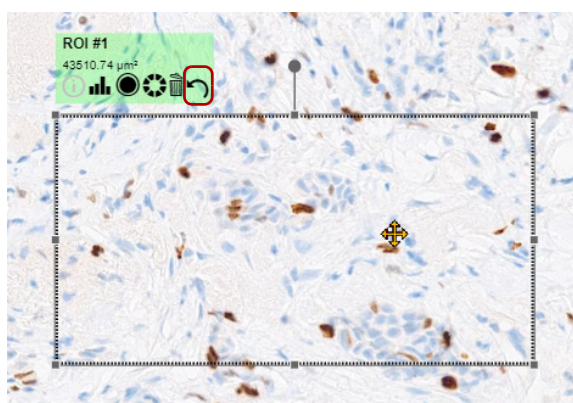
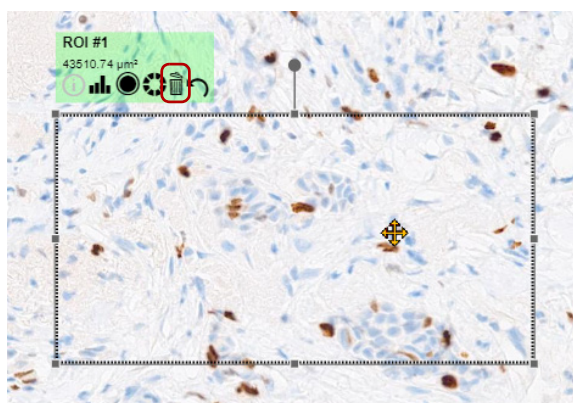
7 Para renombrar la ROI, haga lo siguiente:

- En **SLIDE PANEL**, seleccione el icono  de la ROI que desee renombrar.
- En el panel **ROI DETAILS**, seleccione el icono de lápiz  situado al lado del nombre de la ROI e introduzca el nombre en el campo correspondiente.
- Vuelva a seleccionar el icono  o haga clic fuera del panel **ROI DETAILS**.

→ Se creará un nuevo nombre para la ROI.

8 Para eliminar la ROI, haga lo siguiente:

- Seleccione el icono  en la etiqueta emergente de anotación o en el área de funciones **STATUS PANEL**.
- En el panel **ROI DETAILS**, seleccione el icono .
- Para eliminar varias ROI, mantenga pulsado CTRL y haga clic con el ratón para seleccionar dos o más ROI y, a continuación seleccione el icono .



9 Para deshacer una ROI, seleccione el icono de la flecha que vuelve sobre sí misma en la etiqueta emergente de anotación o en el área de funciones **STATUS PANEL**.


- ❶ uPath software únicamente hace un seguimiento de la última acción del usuario. La opción de deshacer elimina la última acción que se ha realizado en la ROI.

→ La ROI vuelve a estar en la posición anterior.

10 Cuando haya acabado con las modificaciones, seleccione cualquier área fuera de la ROI.

📖 Temas relacionados

- Consulta de la información sobre portaobjetos (80)
- Revisión y edición de portaobjetos (87)
- Creación de una región de interés rápida (98)

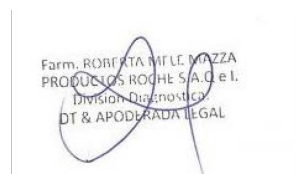

Creación de una región de interés rápida


Se puede crear automáticamente una región de interés (ROI) en la imagen del portaobjetos y asignar una puntuación al portaobjetos.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para usar la opción de ROI rápida

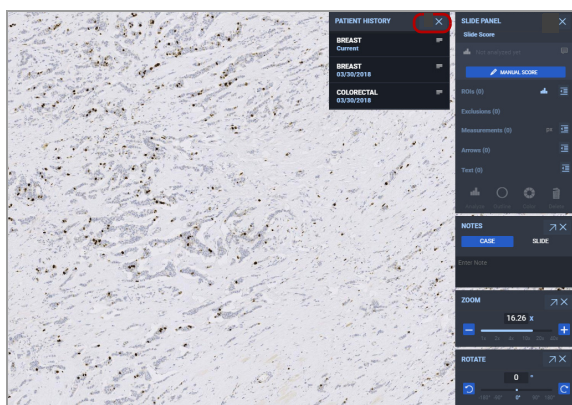

1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, amplíe la imagen.

- Asegúrese de que la ampliación sea adecuada para que el área mostrada no exceda los 5000 px en ninguna dirección.

❶ Las dimensiones de ROI se establecen en función del tamaño de la sección mostrada en la imagen sin ampliar.

→ Se habilitarán los botones del área **ANNOTATION** de la barra de menú Quick Action y la región que desea para la ROI ocupa el área principal de visualización.


2 Cierre todos los paneles del área en la que desee crear la ROI.

3 Seleccione el botón **Quick ROI**.

→ Se crea una ROI que ocupa el área principal de visualización y queda delimitada a mano derecha por cualquier panel abierto.

→ Se realiza un análisis automático.

💡 Si la sección mostrada es mayor que 5000 px en cualquier dirección, no se creará la ROI. Aparecerá una notificación en banner rojo que indica que la ROI excede el límite de tamaño permitido.

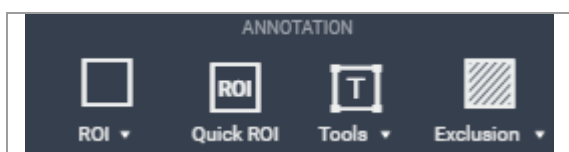

Temas relacionados

- Exclusión de un área de la región de interés (99)
- Creación y modificación de un cuadro de texto en la imagen del portaobjetos (101)
- Creación y personalización de anotaciones de texto (103)
- Creación y edición de una anotación de flecha (106)
- Añadir una medición a una región de interés o tejido (108)

Exclusión de un área de la región de interés

Puede dibujar un área de la imagen del portaobjetos que desee excluir de la región de interés (ROI).



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

Excluir una región de una ROI



1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, amplíe la imagen.





→ Se habilitarán los botones del área ANNOTATION de la barra de menú Quick Action.

2 Haga clic en la ROI de la imagen del portaobjetos.

❶ Cualquier texto, medición o exclusión existente se mostrará en el **SLIDE PANEL**.

→ La ROI seleccionada se resaltará en azul en el **SLIDE PANEL**.

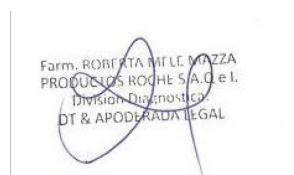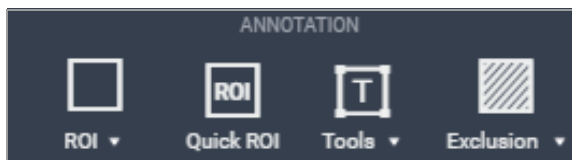

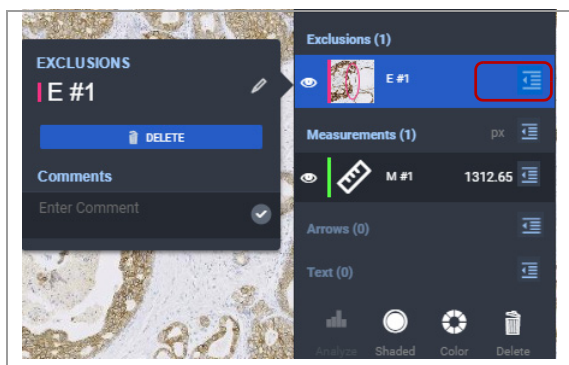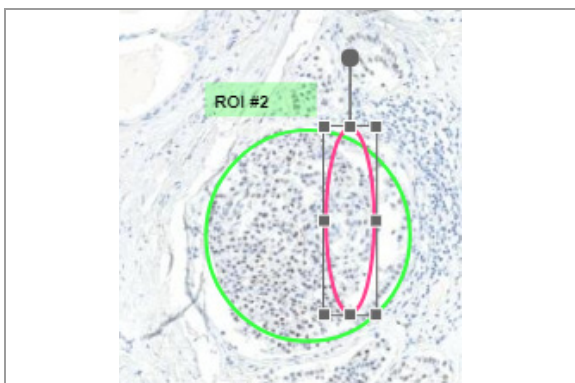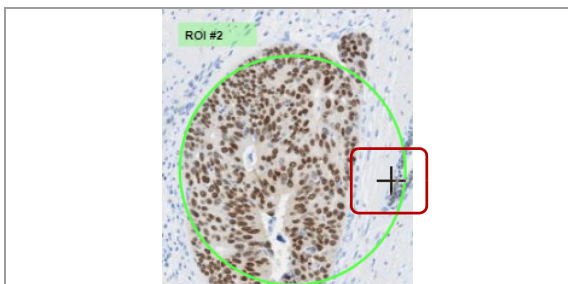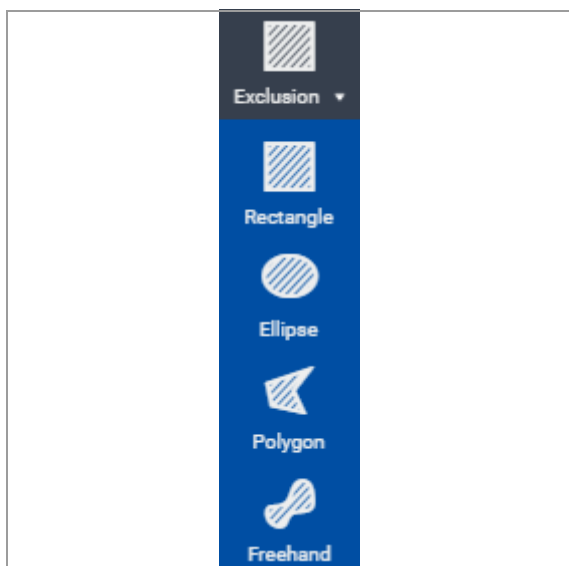

3 Seleccione el botón **Exclusion**.

→ Aparecerá una lista desplegable con las opciones de exclusión disponibles.

4 Seleccione el método para definir la región que desea excluir.

→ El cursor pasa a ser un cursor en forma de cruz.


5 Dibuje la región de exclusión en la ROI seleccionada.

▪ Seleccione **Confirm** para continuar con la eliminación.


❗ Si ya se había realizado un análisis en la ROI, una notificación en banner azul le avisará de que añadir una exclusión podría eliminar los análisis existentes de la ROI.

→ Si ha configurado **Modify ROI with Exclusion** en **Viewer Preferences**, se modificará la ROI para indicar el área excluida.

→ Si ha configurado **Overlay ROI with Exclusion** en **Viewer Preferences**, el área excluida aparece como una anotación independiente que se incluye en el **SLIDE PANEL**.

6 En el área **SLIDE PANEL Exclusions**, seleccione el icono  para mostrar el panel secundario **EXCLUSIONS** cuando proceda.

❗ La región excluida en la ROI seleccionada se excluirá cuando esté disponible el análisis de imagen.

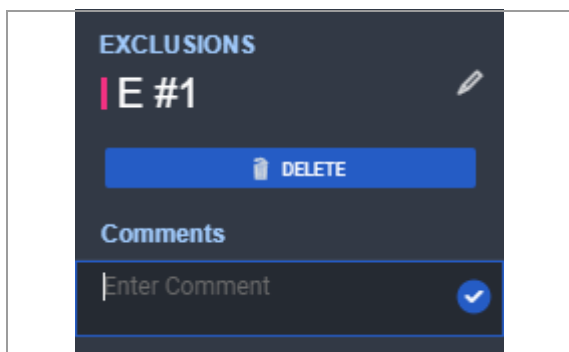

- 7 Realice las revisiones necesarias en el panel secundario **EXCLUSIONS**:
- En el campo **Comments**, introduzca, si lo desea, un comentario.
 - En el campo de nombre de la anotación puede editar el nombre de la exclusión. Para ello, seleccione el icono de lápiz y, a continuación, introduzca el nombre nuevo en el campo correspondiente.
 - Seleccione el icono **DELETE** para eliminar la exclusión y restaurar el área original de la ROI.
 - Para cerrar el panel **EXCLUSIONS**, vuelva a seleccionar el icono de detalles o haga clic en cualquier lugar fuera del panel.
 - Si desea mover o cambiar el tamaño de la última exclusión, seleccione el icono **Undo**. El uPath software únicamente hace un seguimiento de la última acción.
 - Para cerrar el panel **EXCLUSIONS**, vuelva a seleccionar el icono de detalles o haga clic en cualquier lugar fuera del panel.

Temas relacionados

- Creación de una región de interés en una imagen del portaobjetos (93)
- Creación y modificación de un cuadro de texto en la imagen del portaobjetos (101)
- Creación y personalización de anotaciones de texto (103)
- Creación y edición de una anotación de flecha (106)
- Añadir una medición a una región de interés o tejido (108)


Creación y modificación de un cuadro de texto en la imagen del portaobjetos




Puede añadir texto a una imagen del portaobjetos, así como cambiar su tamaño y moverlo a otra posición.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

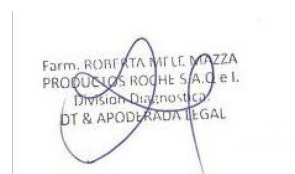

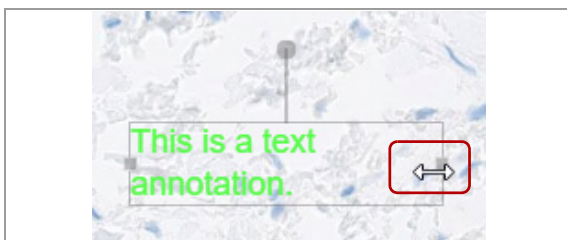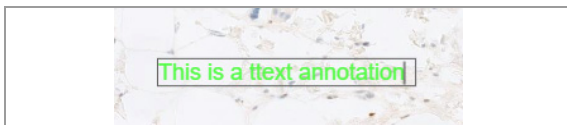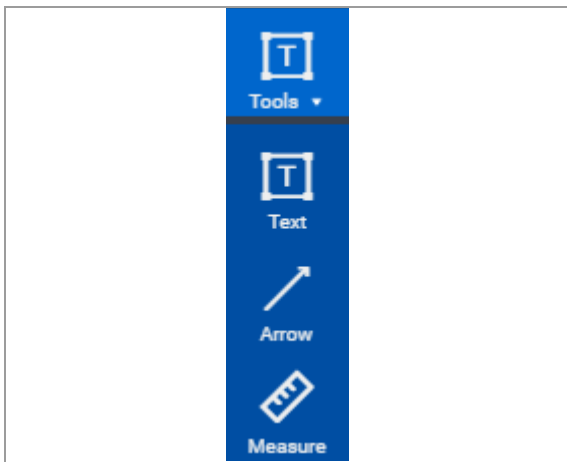

► Para crear una anotación de texto con la configuración de fuente predeterminada

- 1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, amplíe la imagen.
 - Se habilitarán los botones del área ANNOTATION de la barra de menú Quick Action.


- 2 Seleccione **Tools > Text**.
 - El cursor se convierte en un cursor en forma de cruz.

- 3 Haga clic en la parte del portaobjetos en la que desea que se aplique el cuadro de texto y, a continuación, introduzca una anotación. Cuando haya finalizado, haga clic fuera del cuadro de texto.
 - ❶ Al crear una anotación, se añade al **SLIDE PANEL**.

💡 La anotación de texto no tiene una etiqueta de anotación asociada.

- 4 Para editar el texto, haga clic en el cuadro de texto e introduzca el texto nuevo.

- 5 Para redimensionar el cuadro de texto, haga clic en el controlador de cambio de tamaño y arrástrelo.

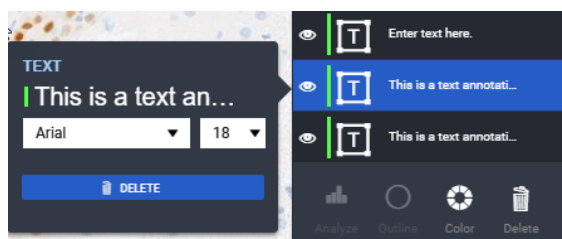

6 Para mover una anotación de texto, mantenga pulsado el puntero hasta que cambie a un puntero de movimiento en cuatro direcciones. A continuación, arrastre el cuadro de texto hasta la posición deseada.

7 Para rotar un cuadro de texto, mueva el puntero a controlador de giro hasta que se convierta en un cursor en forma de cruz.

- Arrastre el controlador para rotar el texto al ángulo deseado.

8 (Opcional) Si desea editar la fuente (tipo, tamaño o color), abra el **SLIDE PANEL**.

- En el área **Text**, seleccione el cuadro de texto que desea abrir en el panel de detalles **TEXT**.

Temas relacionados

- Creación de una región de interés en una imagen del portaobjetos (93)
- Exclusión de un área de la región de interés (99)
- Creación y personalización de anotaciones de texto (103)
- Creación y edición de una anotación de flecha (106)
- Añadir una medición a una región de interés o tejido (108)


Creación y personalización de anotaciones de texto




Puede personalizar la fuente de las anotaciones de texto.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

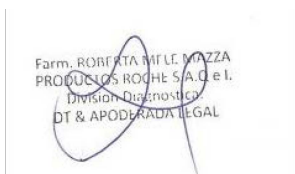

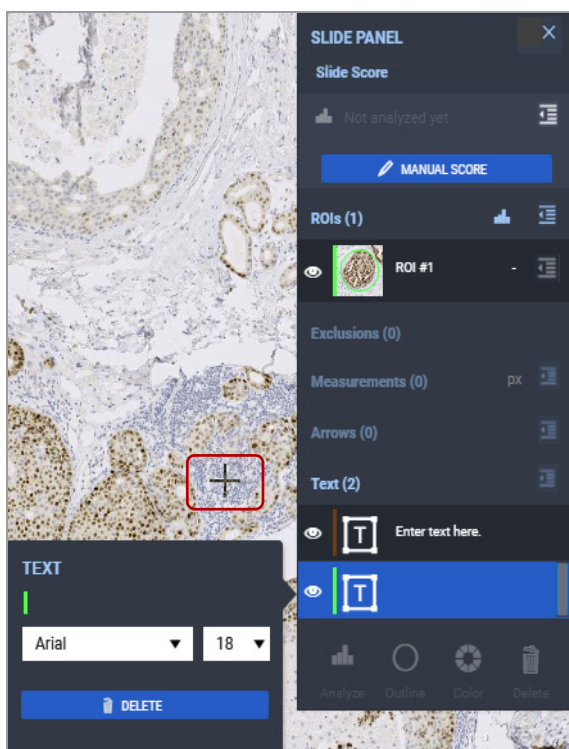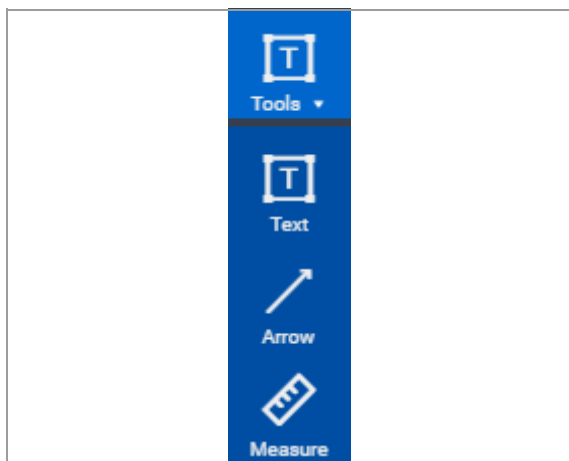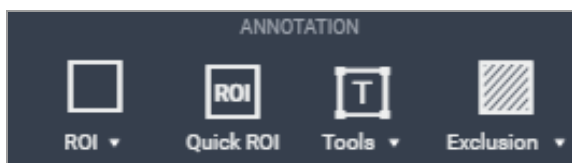


► Para crear y personalizar una anotación de texto


- 1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, amplíe la imagen.
 - Se habilitarán los botones del área ANNOTATION de la barra de menú Quick Action.
 - 2 Seleccione **VIEWER > SLIDE PANEL**.
 - ❶ No es necesario crear una anotación de texto en el **SLIDE PANEL**, pero sí cambiar las propiedades del texto. También puede abrir el **SLIDE PANEL** para las versiones de texto una vez haya creado un cuadro de texto.
 - 3 Seleccione **Tools > Text** en el área **ANNOTATION** de la barra de menú Quick Action.
 - El cursor se convierte en un cursor en forma de cruz.
 - 4 Haga clic en la parte del portaobjetos en la que desea que se aplique el cuadro de texto.
 - Se mostrará el panel secundario **TEXT** en el área **Text** del **SLIDE PANEL**.
 - Aparecerá un cuadro de texto en la imagen.
- 💡 La anotación de texto no tiene una etiqueta de anotación asociada.

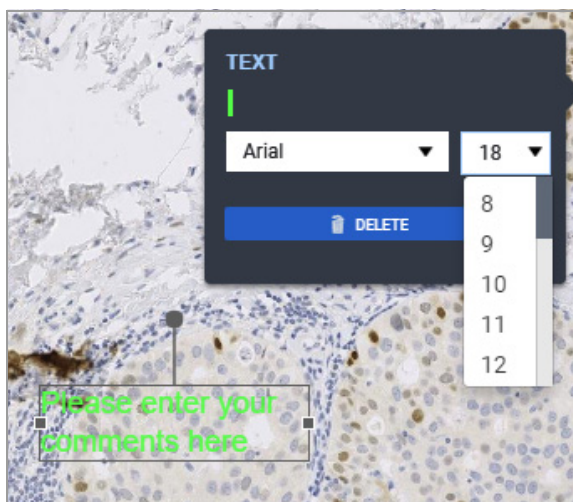

- 5 En el panel secundario **TEXT**, realice selecciones de la fuente y el tamaño de la fuente en las listas desplegables.

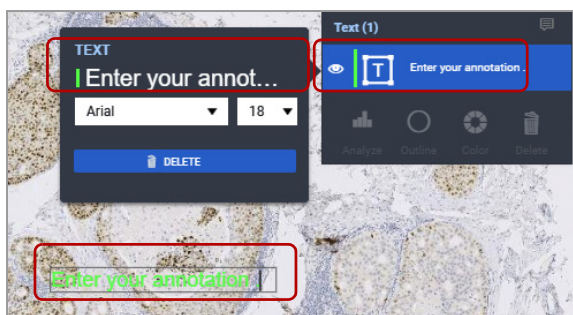


- 6 Haga clic en el cuadro del texto e introduzca la anotación.
→ El texto que introduzca en el cuadro de texto también se mostrará en el área **Text** del **SLIDE PANEL** y en el panel secundario **TEXT**.

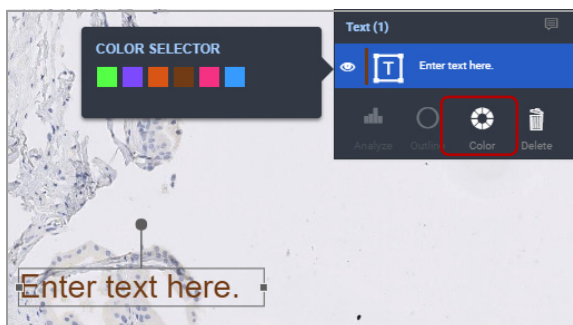

- 7 Para cambiar el color de la fuente, seleccione el botón **Color** en el **SLIDE PANEL**.
→ Se muestra el panel **COLOR SELECTOR**.
- 8 Seleccione el color deseado para la fuente del cuadro de texto.

Temas relacionados

- Creación de una región de interés en una imagen del portaobjetos (93)
- Exclusión de un área de la región de interés (99)
- Creación y modificación de un cuadro de texto en la imagen del portaobjetos (101)
- Creación y edición de una anotación de flecha (106)
- Añadir una medición a una región de interés o tejido (108)

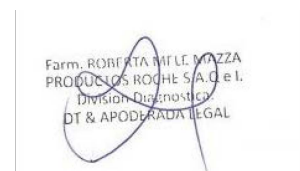

Creación y edición de una anotación de flecha







Puede añadir flechas y anotaciones para la evaluación y el análisis.


Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.


► Para añadir y editar anotaciones de flechas

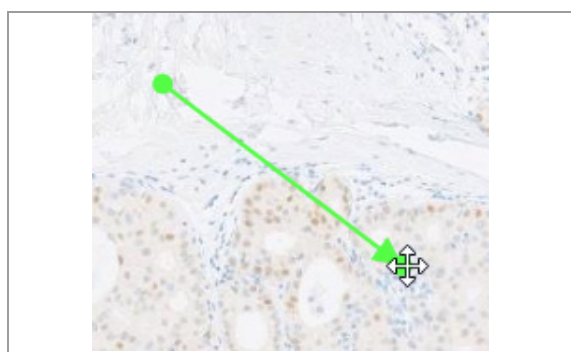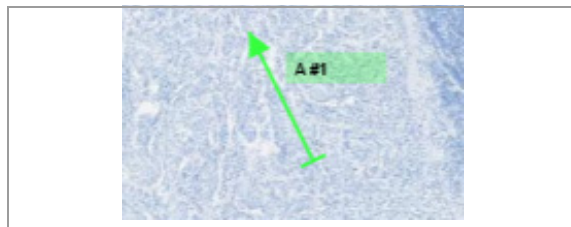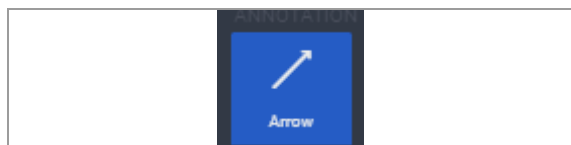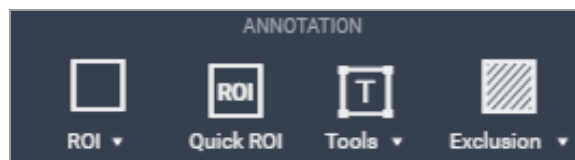


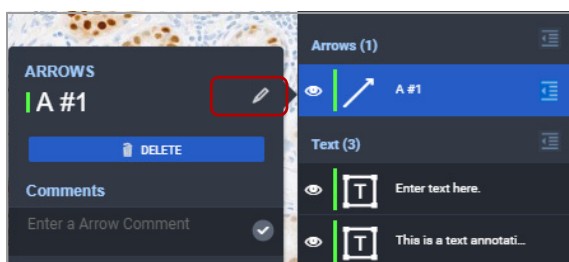
- 1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, amplíe la imagen.
 - Se habilitarán los botones del área ANNOTATION de la barra de menú Quick Action.
- 2 Seleccione **Arrow**.
 - El puntero pasa a ser un cursor en forma de cruz.
- 3 Mueva el cursor sobre el área en la que desearía crear la flecha y, a continuación, haga clic y arrastre el cursor para crearla.
 - Se creará la flecha y aparecerá una etiqueta de anotación con el número de flecha (A#).
 - La información de la flecha se añade al **SLIDE PANEL**.
- 4 Para cambiar la ubicación de la flecha, haga clic en la línea de la flecha y, a continuación, arrástrela a la posición deseada.
 - ❶ La medida predeterminada establecida son los micrómetros. La medida alternativa son los píxeles.
- 5 Para cambiar la longitud o la dirección de la flecha, haga clic en controlador de la flecha (en cada extremo) y arrástrelo hasta el ángulo deseado.

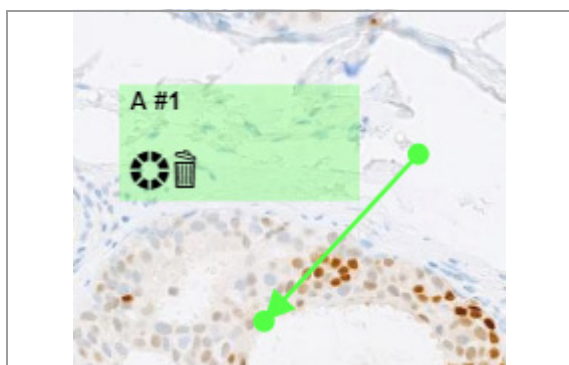


- 6 Para editar el color de la flecha o su etiqueta de anotación, realice cualquiera de las operaciones siguientes:
- Haga clic en la flecha para que se abra la etiqueta emergente de anotación.
 - Abra el **SLIDE PANEL** y seleccione la flecha que desee editar. Haga clic en el icono .

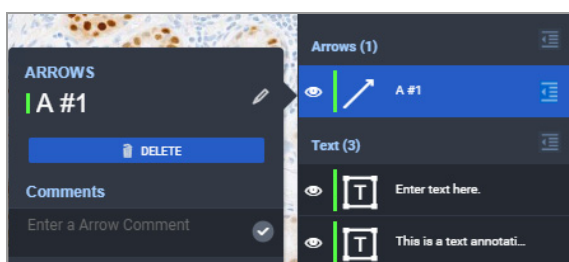



- 7 Abra **SLIDE PANEL**, seleccione la flecha que desee editar y, a continuación, haga clic en el icono .
- Se mostrará el panel secundario **ARROWS**.



- 8 Para modificar la etiqueta de anotación, haga lo siguiente:
- En el panel secundario **ARROWS**, seleccione el icono de lápiz situado al lado del nombre para habilitar el campo nombre para su edición.
 - En el campo nombre, elimine el nombre antiguo e introduzca un nombre nuevo.
- El nuevo nombre aparecerá en todas las ubicaciones, incluida la etiqueta de anotación asociada a la flecha.

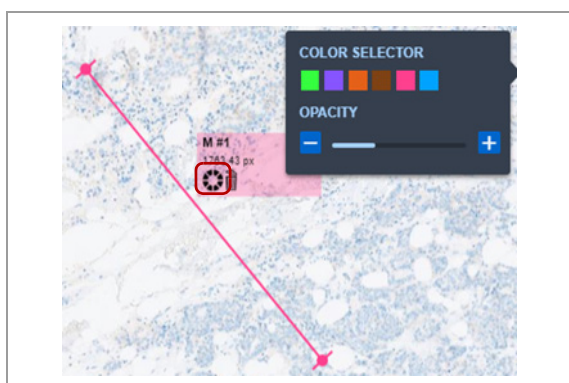

- 9 Para cambiar el color de una flecha, realice una de las operaciones siguientes:
- Seleccione el botón **Color** en **SLIDE PANEL**.
 - Seleccione el icono de color de la etiqueta emergente de anotación para que se abra el panel **COLOR SELECTOR**.

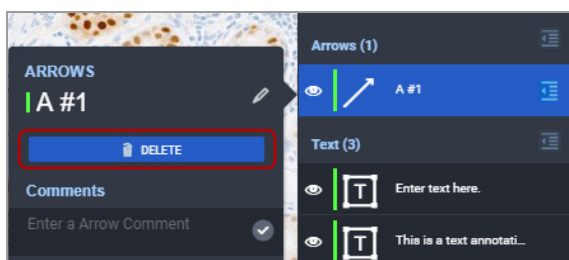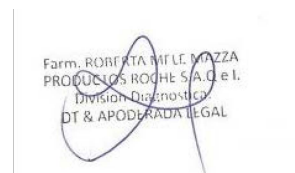

- 10 Para eliminar la anotación de la flecha, seleccione el botón **DELETE** en el panel secundario **ARROWS**.
- ❶ También puede eliminar la flecha seleccionando el icono eliminar en la etiqueta emergente de anotación.

Temas relacionados

- Creación de una región de interés en una imagen del portaobjetos (93)
- Exclusión de un área de la región de interés (99)
- Creación y modificación de un cuadro de texto en la imagen del portaobjetos (101)
- Creación y personalización de anotaciones de texto (103)
- Añadir una medición a una región de interés o tejido (108)

Añadir una medición a una región de interés o tejido



Las mediciones se pueden añadir como anotaciones a la región de interés (ROI) de la imagen de un portaobjetos. La medida predeterminada es el micrómetro (μm).



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.


Para añadir una medición a una ROI o a una porción de tejido

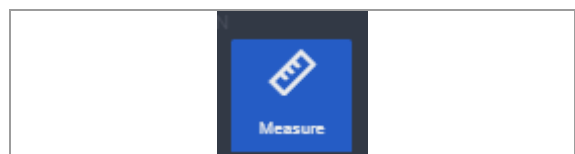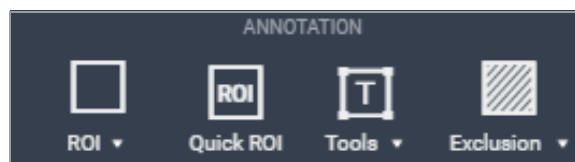


- 1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, amplíe la imagen.
 - Se habilitarán los botones del área ANNOTATION de la barra de menú Quick Action.
- 2 Seleccione **Measure**.
 - El puntero pasa a ser un cursor en forma de cruz.
- 3 Mueva el cursor sobre el área en la que desearía crear la medición y, posteriormente, haga clic y arrastre el cursor para crearla.
 - Aparecerá una etiqueta de anotación con el número de anotación (M#) y la medición sobre la línea.
 - La información de la anotación se añade al **SLIDE PANEL**.




Las unidades de medición dependen de su configuración de **User Preferences** para la **Viewer Configuration**.

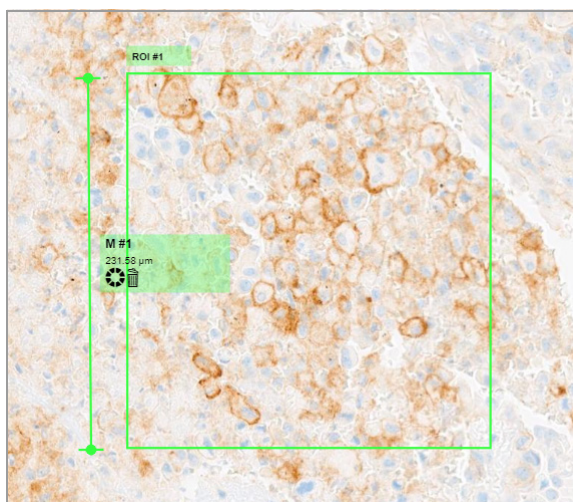


- 4 Para cambiar la ubicación de la medición, haga clic en la línea y, a continuación, arrástrela a la posición deseada.

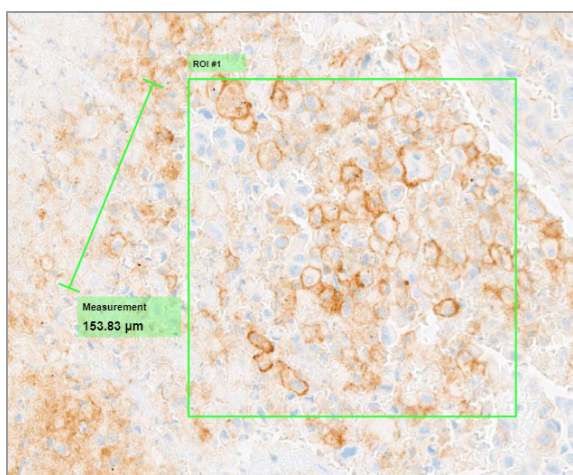

- 5 Para cambiar la longitud o el ángulo de la línea, haga clic en el controlador de arriba o de abajo y, a continuación, arrástrelo hasta el ángulo deseado.

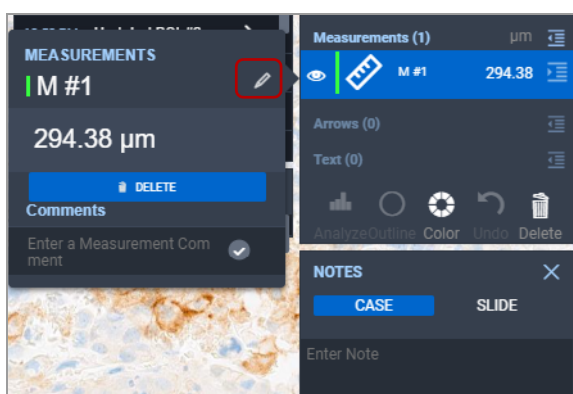


- 6 Para editar la información de la línea, haga clic en ella para abrir la etiqueta emergente de anotación o seleccione el icono  situado al lado de la medición en **SLIDE PANEL**.

→ Se abrirá el panel secundario **MEASUREMENTS**.

- 7 Para editar el nombre de la medición, haga lo siguiente:


- En el panel secundario **MEASUREMENTS**, seleccione el icono de lápiz situado al lado del nombre para habilitar el campo nombre para su edición.
 - En el campo nombre, elimine el nombre antiguo e introduzca un nombre nuevo.
- El nuevo nombre aparecerá en todas las ubicaciones, incluida la etiqueta de anotación.

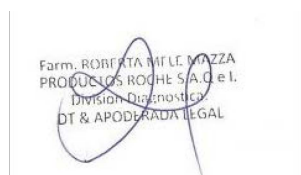



8 Para cambiar el color de la línea, seleccione el botón **Color** en el **SLIDE PANEL** o haga clic en el icono de color de la etiqueta emergente de anotación para mostrar el panel **COLOR SELECTOR**.

- Seleccione el color deseado para la línea.

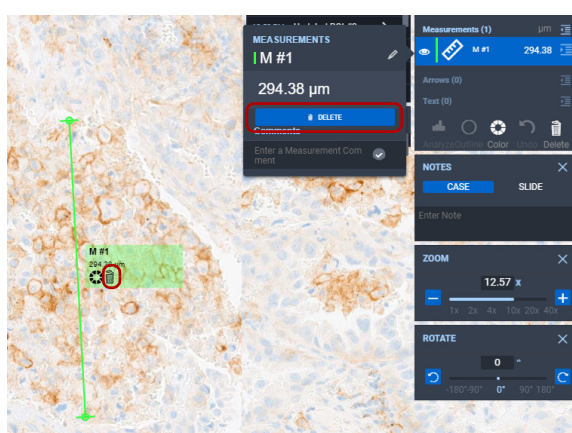

9 Para descartar la medición, seleccione el botón **DELETE** en el panel secundario **MEASUREMENTS**, o haga clic en el icono eliminar de la etiqueta emergente de anotación.

Temas relacionados

- Creación de una región de interés en una imagen del portaobjetos (93)
- Exclusión de un área de la región de interés (99)
- Creación y modificación de un cuadro de texto en la imagen del portaobjetos (101)
- Creación y personalización de anotaciones de texto (103)
- Creación y edición de una anotación de flecha (106)

Análisis de las imágenes del portaobjetos

Contenidos de esta sección

Acerca de las herramientas de análisis y la región de interés (111)


Análisis automático de una región de interés (112)

Introducción de un análisis manual (116)


Acerca de las herramientas de análisis y la región de interés

Puede mostrar una región de interés (ROI) y, a continuación, realizar un análisis de ROI asistido por ordenador automático o manual, siempre que esté disponible el algoritmo de análisis de imágenes.

Resultados del análisis automático

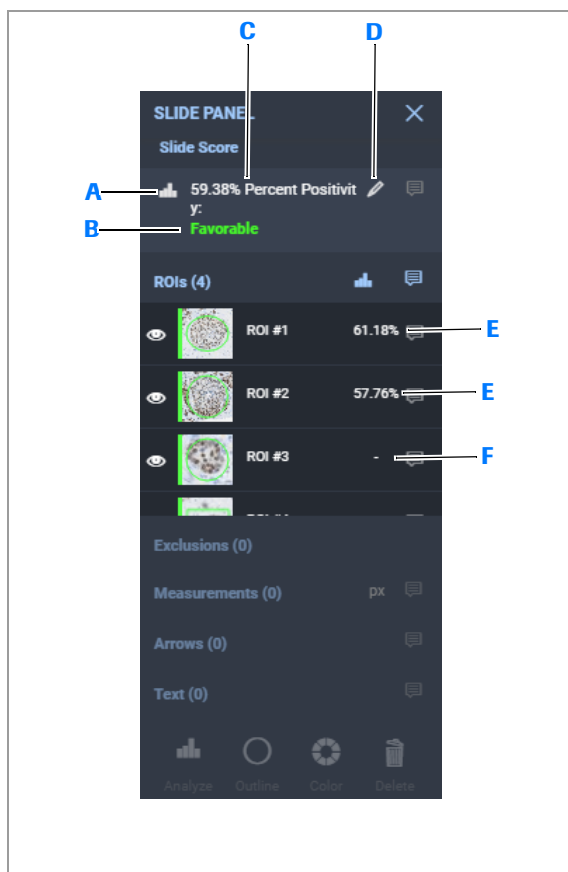


- A** Icono de análisis (indica el análisis automatizado)
- B** Pronóstico
- C** Puntuación del portaobjetos (compuesta)
- D** Editar función
- E** Puntuación de ROI individual (automatizada)
- F** ROI no analizada

El botón  genera los resultados de un análisis asistido por ordenador e incluye una puntuación del portaobjetos basada en el patrón de tinción específico de la prueba. La puntuación del portaobjetos se muestra en el área **Slide Score** del **SLIDE PANEL** y se incluye en el informe.

La puntuación de un portaobjetos se puede determinar mediante una ROI única o diversas ROI. Los rangos de referencia para la agrupación de pronósticos se incluyen en el informe y no se pueden revisar.


El administrador puede configurar los resultados adicionales del análisis asistido por ordenador de la pantalla **VIEWER** que se incluirán en el informe. Existen resultados disponibles para cada ROI y dependen del algoritmo.

Si se analizan diversas ROI de un portaobjetos, se genera una puntuación compuesta utilizando factores de ponderación desarrollados por el algoritmo. Cuando desea editar una puntuación de un portaobjetos asistida por ordenador, el análisis se convierte en manual.

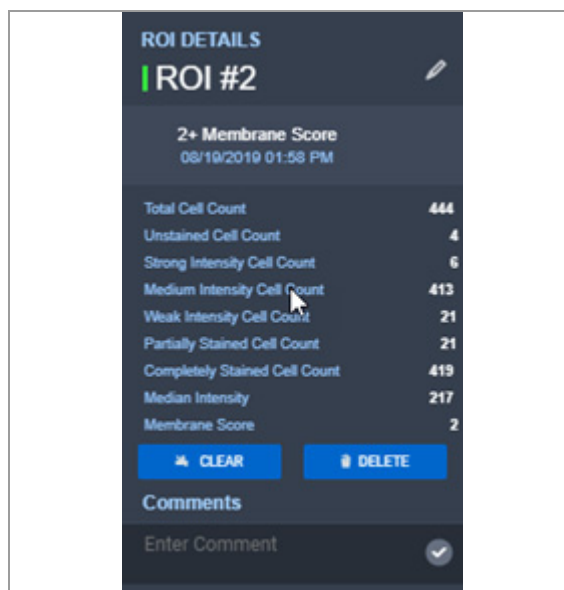

Farm. ROBERTA NITILE MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostico
DT & APODERADA LEGAL

Análisis manual

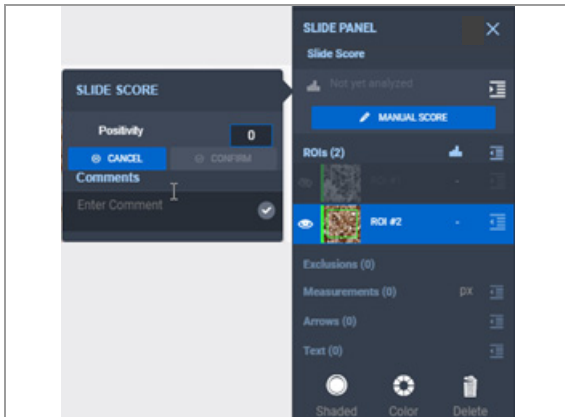

Se pueden realizar análisis manuales cuando los portaobjetos teñidos no se generaron utilizando el sistema VENTANA prescrito o en lugar de un análisis asistido por ordenador. Se puede introducir la puntuación de un portaobjetos manualmente con el botón **MANUAL SCORE**, pero no se pueden introducir puntuaciones de ROI individuales.

El administrador puede configurar las categorías de pronóstico para la puntuación de la prueba manual.

Análisis automático de una región de interés

El análisis del portaobjetos identifica las células y las características en las imágenes de portaobjetos para su posterior revisión. Los detalles del análisis del portaobjetos son específicos para cada algoritmo.

Puede acceder a la función de análisis desde la etiqueta emergente de anotación de la región de interés (ROI) o desde el **SLIDE PANEL**. En caso de que el algoritmo de análisis no esté disponible para el método de tinción utilizado, la herramienta de análisis tampoco estará disponible. Sin embargo, puede utilizar la opción de puntuación manual en el **SLIDE PANEL** para introducir una puntuación.

Utilice las herramientas ANNOTATION para medir o excluir partes de la ROI. Una vez finalizada la revisión de la ROI, un algoritmo de software evalúa la ROI y genera un recuento de células.

Para obtener más información, consulte la guía del algoritmo.



Asegúrese de que la siguiente orientación se encuentra disponible antes de iniciar este procedimiento.


- Guía del algoritmo del método de tinción para poder consultarla durante el análisis de imagen automatizado.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla VIEWER está abierta.
- Se ha creado una ROI.
- Para realizar el análisis automático, debe estar instalado un algoritmo para el tipo de tinción.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para analizar una ROI

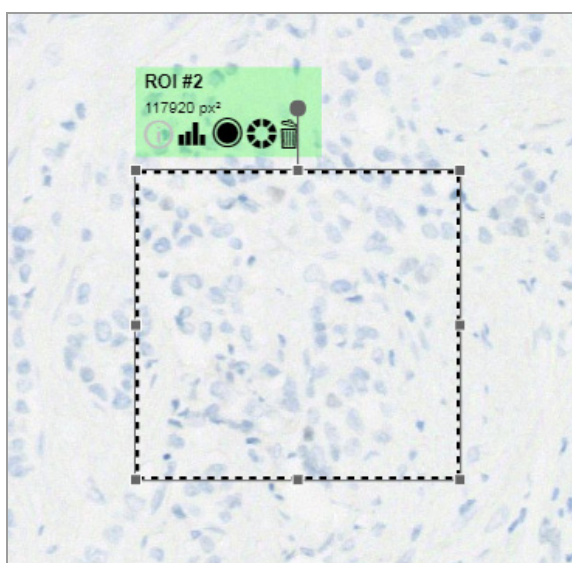



1 Seleccione un portaobjetos para analizar y, a continuación, haga clic en la ROI que desea analizar, o bien seleccione la ROI que le interese en el **SLIDE PANEL**.



- Aparece la etiqueta emergente de anotación asociada a la ROI.
- La ROI seleccionada se resaltará en azul en el área de anotación del **SLIDE PANEL**.



2 Para realizar un análisis:

- En el desplegable de anotaciones ROI, seleccione el icono .
- En **SLIDE PANEL**, seleccione el botón .
- Se lleva a cabo el análisis.
- En la parte superior de **SLIDE PANEL** se muestra la puntuación del portaobjetos en el área **Slide Score** como un compuesto ponderado de todas las ROI del portaobjetos analizadas.
- Los resultados del análisis para la ROI individual se muestran en el panel **ROI DETAILS**. Si hay un área excluida del ROI, el área no se incluirá en los resultados del análisis.

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A.C e.I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

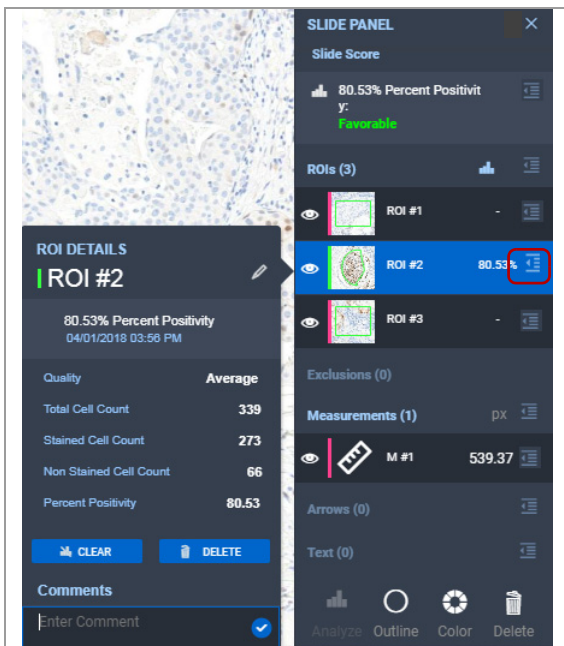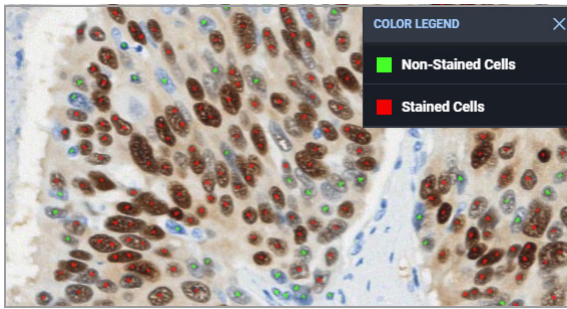



- 3 Para interpretar el código de color utilizado en la puntuación del portaobjetos, seleccione **VIEWER > COLOR LEGEND**.
 - Amplíe la imagen para ver las etiquetas codificadas por color sobre las células y observar cómo el algoritmo categoriza las células en cada ROI utilizada para generar la puntuación del portaobjetos.
 - ❶ También puede abrir el panel **COLOR LEGEND** seleccionando el icono de información en la etiqueta de anotación de una ROI.

- 4 En **SLIDE PANEL**, seleccione el icono de detalles de la ROI para mostrar el panel **ROI DETAILS** con el análisis de la misma. Realice cualquiera de las operaciones siguientes:
 - Introduzca un comentario, si así lo desea.
 - Edite el título de la ROI seleccionando el icono del lápiz e introduciendo a continuación un nombre nuevo en el campo nombre (el nuevo nombre se mostrará en todas las ubicaciones, entre otras, en la muestra de tejido).
 - Este nombre nuevo aparecerá en todas las ubicaciones, incluida la muestra de tejido. Para eliminar el análisis de ROI, seleccione el botón **CLEAR**.
 - Para eliminar la ROI, seleccione el botón **DELETE**.
 - Para cerrar el panel, haga clic fuera del panel **ROI DETAILS**.

- 5 Repita el análisis para ROI adicionales del portaobjetos.
 - ❶ Cuando se analizan diversas ROI, la puntuación del portaobjetos es un resultado compuesto.


Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

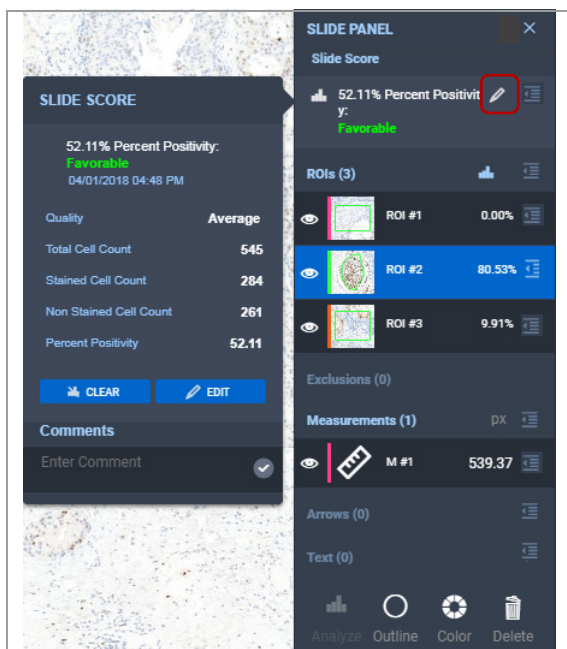

6 Para editar la información del análisis, haga clic en el botón  en **Slide Score**, dentro del panel **SLIDE PANEL**. Realice cualquiera de las operaciones siguientes:

- Introduzca un comentario, si así lo desea.
- Para eliminar la puntuación del portaobjetos, seleccione el botón **CLEAR**.
- Para cerrar el panel **SLIDE SCORE**, vuelva a seleccionar el icono de lápiz en el área de puntuación **SLIDE PANEL**.

❗ **IMPORTANTE:** Si edita la puntuación del portaobjetos, se eliminarán tanto la puntuación automática del portaobjetos como las puntuaciones individuales de ROI del **SLIDE PANEL** y las áreas asociadas. El resultado se convierte en un análisis manual.

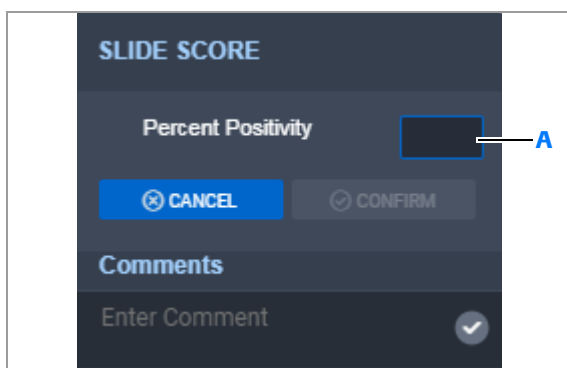

A Campo de puntuación manual, disponible cuando está seleccionado el botón **Edit** en el panel de detalles **SLIDE SCORE**.

7 Para editar la puntuación del portaobjetos, seleccione el botón **EDIT** en el panel secundario **SLIDE SCORE** y, a continuación, introduzca la puntuación editada.

8 Para mostrar el panel **ROI DETAILS** y ver los resultados del análisis para una ROI concreta, seleccione en **SLIDE PANEL** el icono de detalles de la ROI que le interesa en cualquier momento posterior al análisis.

Temas relacionados

- Creación de una región de interés en una imagen del portaobjetos (93)
- Exclusión de un área de la región de interés (99)
- Creación y modificación de un cuadro de texto en la imagen del portaobjetos (101)
- Creación y edición de una anotación de flecha (106)
- Añadir una medición a una región de interés o tejido (108)

Introducción de un análisis manual

Puede introducir una puntuación manual para una imagen del portaobjetos y añadir comentarios acerca de este.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- El administrador establece la configuración del análisis manual.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.


► Para introducir un análisis manual para un portaobjetos


- 1 Seleccione un portaobjetos para analizar y, a continuación, en el **SLIDE PANEL**, seleccione el botón **MANUAL SCORE** del área de **Slide Score**.
→ Se mostrará el panel secundario **SLIDE SCORE**.

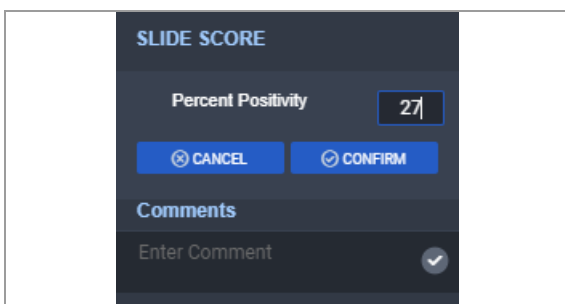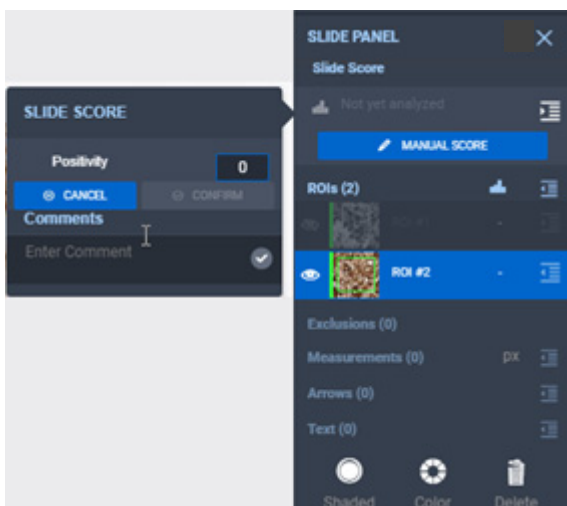

- 2 En el campo **Percent Positivity**, introduzca la puntuación y, luego, seleccione el botón **CONFIRM** para guardarla.
 - (Opcional) En el campo **Comments**, introduzca un comentario.

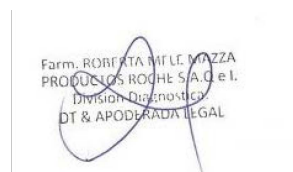

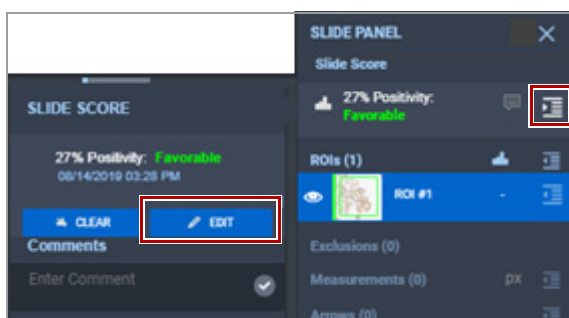

3 Para editar la puntuación del portaobjetos, seleccione el botón  en **SLIDE PANEL** para abrir el panel secundario **SLIDE SCORE**. Realice cualquiera de las operaciones siguientes:

- Seleccione el botón **EDIT** y, a continuación, introduzca la puntuación editada.
- Para eliminar la puntuación, seleccione el botón **CLEAR**.
- (Opcional) En el campo **Comments**, añada un comentario.

Temas relacionados

- Creación de una región de interés en una imagen del portaobjetos (93)
- Exclusión de un área de la región de interés (99)
- Creación y modificación de un cuadro de texto en la imagen del portaobjetos (101)
- Creación y edición de una anotación de flecha (106)
- Añadir una medición a una región de interés o tejido (108)

Utilización de herramientas de análisis

Contenidos de esta sección

- Aumento de imágenes del portaobjetos (118)
- Visualización de un nivel de enfoque para los portaobjetos escaneados (120)
- Seguimiento de la visualización del portaobjetos (121)
- Registro de portaobjetos (124)
- Visualización de portaobjetos en tándem (125)
- Visualización de portaobjetos por separado (127)
- Rotación de las imágenes del portaobjetos (129)
- Calibración del color del portaobjetos (131)
- Aplicación de una calibración de color predeterminada a un portaobjetos (133)

Aumento de imágenes del portaobjetos

Puede seleccionar un portaobjetos y aumentar la imagen para evaluar o hacer un seguimiento de áreas del portaobjetos que ya se han visualizado. El seguimiento de los portaobjetos es especialmente útil cuando la imagen está aumentada y solo se visualiza una pequeña porción del portaobjetos. También puede ver dos portaobjetos al mismo tiempo.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para seleccionar un portaobjetos y ver una imagen

- 1 Seleccione un portaobjetos en el área principal de visualización o desde el panel **ALL SLIDES**.
 - El portaobjetos seleccionado tiene un contorno azul claro.

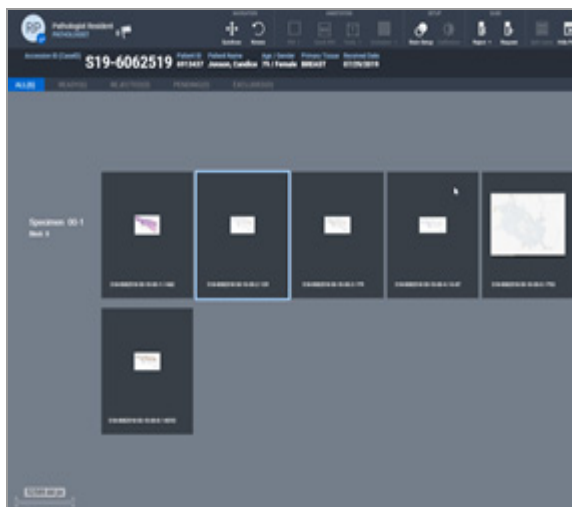

- 2 Haga doble clic en el portaobjetos seleccionado para ampliar la imagen.

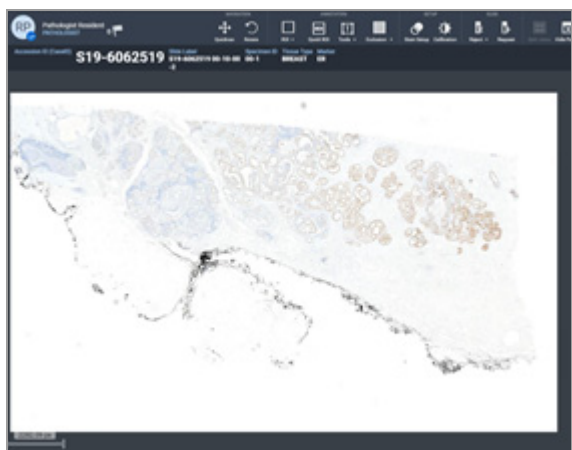

Farm. ROBERTA MITLE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. Q e I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

- 8 Utilice la rueda del ratón y el **ZOOM** del panel para ajustar el tamaño de los portaobjetos según sea necesario.

📄 **Temas relacionados**

- Lista de atajos del teclado (50)
- Revisión y cualificación de los portaobjetos (86)
- Creación y modificación de una región de interés (93)
- Análisis de las imágenes del portaobjetos (110)

Visualización de un nivel de enfoque para los portaobjetos escaneados

Puede seleccionar un nivel de enfoque de una imagen del portaobjetos.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.



- La imagen se ha escaneado a varios niveles de enfoque.
- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.


► Para seleccionar y ver un nivel de enfoque

- 1 Seleccione un portaobjetos que se haya escaneado a múltiples distancias de enfoque.
- 2 Seleccione **VIEWER > Focus Level**.



El panel **FOCUS LEVELS** recoge una lista del número de capas escaneadas para cada imagen del portaobjetos.

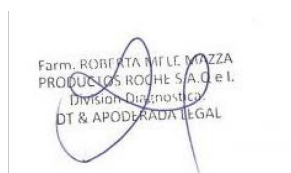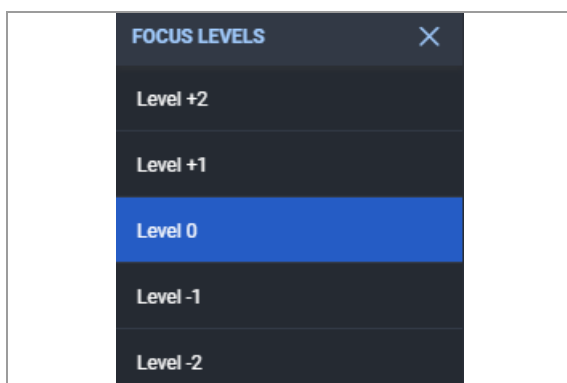

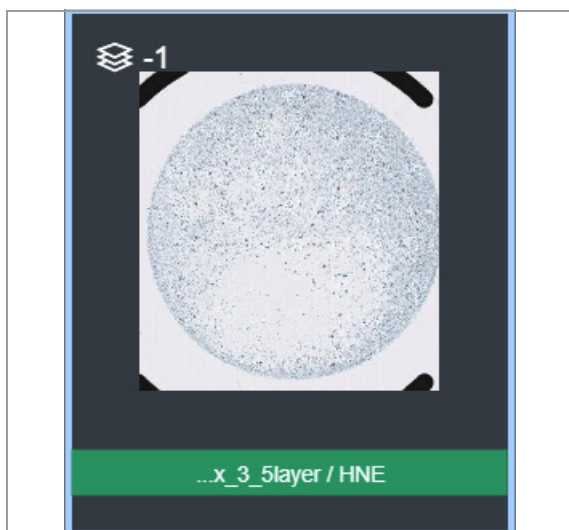

- 3 En el panel **FOCUS LEVELS**, seleccione el nivel que desee visualizar.
 - El nivel escogido aparecerá en la imagen del portaobjetos.

Temas relacionados

- Lista de atajos del teclado (50)
- Revisión y cualificación de los portaobjetos (86)
- Creación y modificación de una región de interés (93)
- Análisis de las imágenes del portaobjetos (110)

Seguimiento de la visualización del portaobjetos

Puede hacer un seguimiento de las áreas de interés que haya visualizado en una imagen del portaobjetos.






Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para hacer un seguimiento de la visualización del portaobjetos

- 1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, amplíelo.
 - Se habilitarán los botones del área **VIEW** de la barra de menú Quick Action.

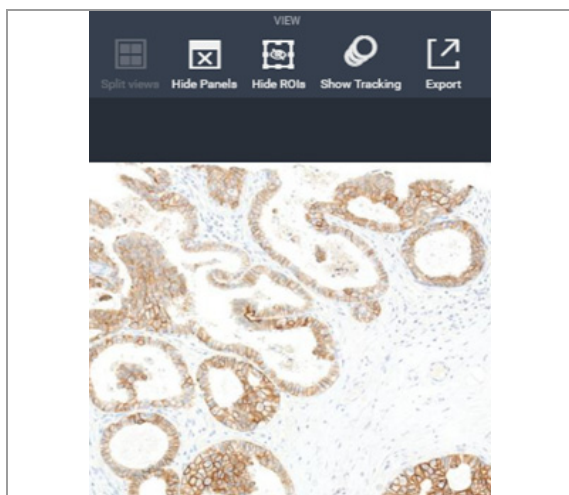

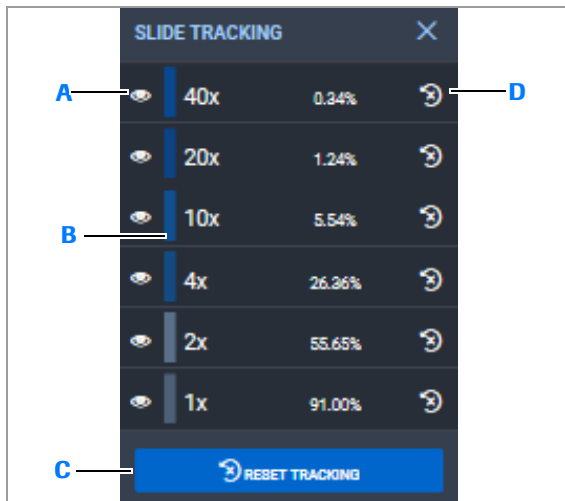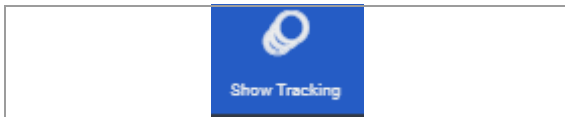

A Icono de mostrar y ocultar para eliminar el seguimiento del aumento

C Botón **RESET TRACKING**

B Color para el seguimiento de áreas de 10X en el panel **SLIDE NAVIGATION**.

D Restablecer el seguimiento para un nivel de aumento


2 Seleccione el botón de alternar **Show Tracking** para destacar las áreas visualizadas en la miniatura del panel **SLIDE NAVIGATOR** a medida que se desplaza por la imagen.


→ El botón **Show Tracking** cambia a un botón **Hide Tracking**, que se utiliza para desactivar la función de seguimiento.



3 Seleccione **VIEWER > SLIDE TRACKING** y desplácese sobre la imagen.

→ En el panel **SLIDE TRACKING** se muestra el porcentaje de imagen visualizada a un aumento concreto y el color de seguimiento para cada aumento.

→ El seguimiento de las áreas visualizadas se realiza en la miniatura en el panel **SLIDE NAVIGATION**.



 El botón **Show Tracking** de la barra del menú Quick Action debe estar activado antes de poder seleccionar el panel **SLIDE TRACKING**.

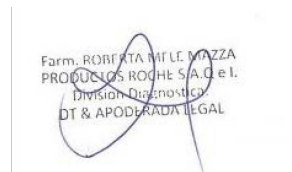

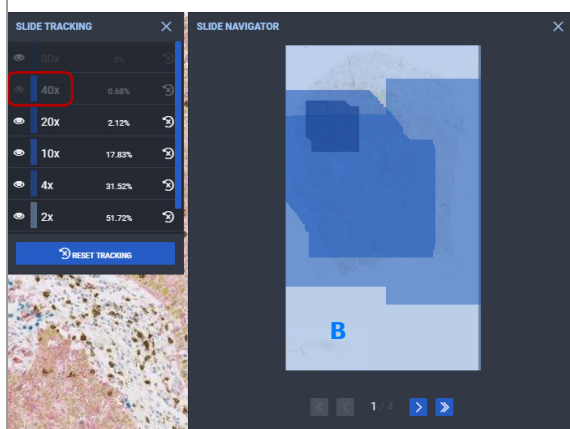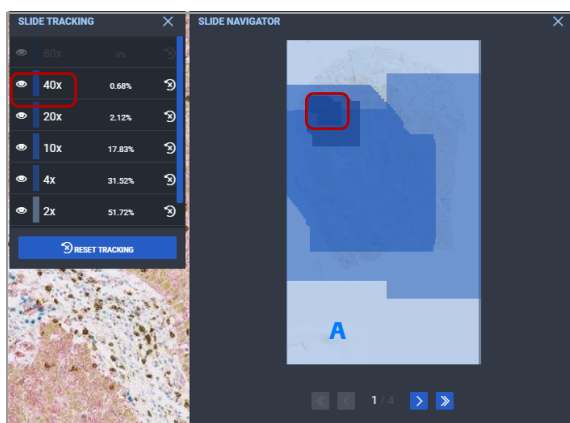

A Seguimiento de las áreas visualizadas con aumento 40X

B Icono de mostrar y ocultar seleccionado para ocultar el seguimiento de las áreas visualizadas con aumento 40X

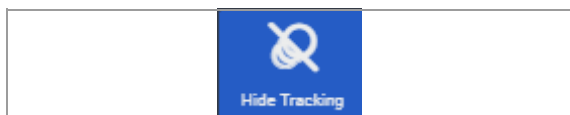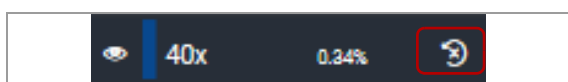

4 En el panel **SLIDE TRACKING**, seleccione el icono de mostrar y ocultar o muestre un resultado de seguimiento.

→ El seguimiento para dicho aumento se elimina de la imagen en miniatura del panel **SLIDE NAVIGATION**.

5 Para restablecer la métrica de seguimiento, realice cualquiera de las operaciones siguientes:

- Seleccione el icono restablecer para restaurar la métrica de seguimiento a un aumento concreto.
- Seleccione el botón **RESET TRACKING** para restablecer las métricas de todos los aumentos y elimine el seguimiento del panel **SLIDE NAVIGATION**.

6 En la barra de menú Quick Action, seleccione el botón **Hide Tracking** para ocultar los resultados de seguimiento del panel **SLIDE NAVIGATION**.

Temas relacionados

- Lista de atajos del teclado (50)
- Revisión y cualificación de los portaobjetos (86)
- Creación y modificación de una región de interés (93)
- Análisis de las imágenes del portaobjetos (110)

Registro de portaobjetos




Puede utilizar las coordenadas de rotación de un portaobjetos y aplicarlas a un máximo de 8 portaobjetos.

Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para registrar portaobjetos

- 1 Seleccione el portaobjetos que quiere utilizar para configurar las coordenadas y, a continuación, pulse CTRL+clic en el segundo portaobjetos.
 - Se seleccionarán ambos portaobjetos.

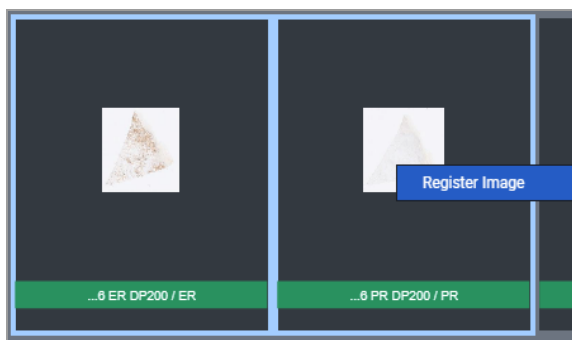

- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el segundo portaobjetos y seleccione el botón **Register Image**.

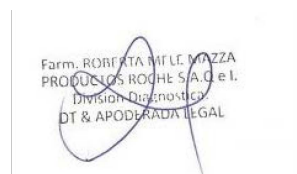

- 3 Espere hasta que termine el proceso de registro.
 - La imagen se gira para registrarse con la primera y el icono de rotación se muestra en la imagen.
 - Un mensaje de notificación verde que indica que los dos portaobjetos se registraron correctamente.

💡 Si la correlación entre ambas imágenes es insuficiente, recibirá un aviso en un mensaje de notificación rojo.

Temas relacionados

- Lista de atajos del teclado (50)
- Revisión y cualificación de los portaobjetos (86)
- Creación y modificación de una región de interés (93)
- Análisis de las imágenes del portaobjetos (110)

Visualización de portaobjetos en tándem


Puede ver hasta seis portaobjetos en tándem para desplazarse por las imágenes.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.


Para visualizar portaobjetos en tándem

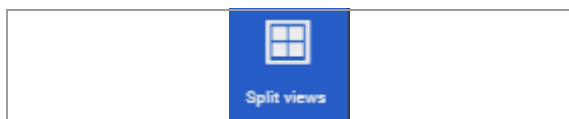

1 Seleccione el portaobjetos que desea ver, pulse CTRL y haga clic en cada portaobjetos que desee consultar en tándem, hasta un máximo de seis.

2 En la barra de menú Quick Action, seleccione el botón **Split views**.

→ Se amplían las imágenes.

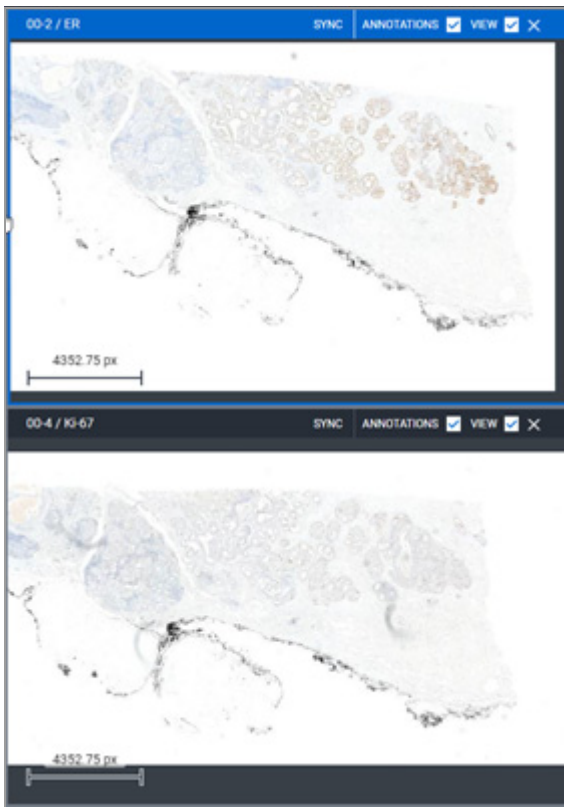


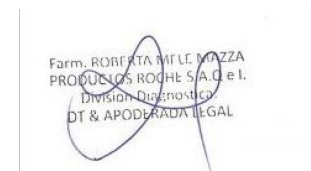
3 Para desplazarse entre las imágenes de forma simultánea:


- Amplíe las imágenes y desplácese por ellas en tándem.
- Desmarque la casilla de verificación **VIEW** para desplazarse por una imagen individual.
- ❶ La imagen principal tiene un indicador azul en la parte superior. Esta es la imagen que se utiliza para establecer las coordenadas para el registro o bien el primer portaobjetos seleccionado, en caso de que el registro no sea necesario.



4 Para asociar las imágenes o realizar un análisis en la vista dividida, seleccione la casilla de verificación ANNOTATIONS en cada imagen.

- Dibuje una ROI en una ventana y esta aparecerá en las imágenes en la vista dividida.
- Seleccione el botón  para realizar un análisis.
- ❶ Si se desmarca la casilla de verificación ANNOTATIONS, la anotación únicamente se aplicará al portaobjetos seleccionado.



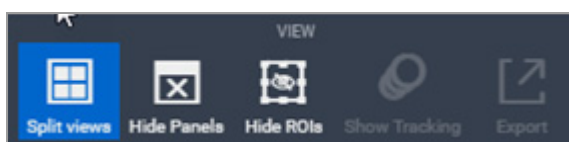

5 Utilice el **SLIDE NAVIGATOR** para ver su ubicación en las imágenes.

6 Vuelva a seleccionar el botón **Split views** para eliminar la vista dividida y volver a ver todos los portaobjetos en el área principal de visualización.

Temas relacionados

- Lista de atajos del teclado (50)
- Revisión y cualificación de los portaobjetos (86)
- Creación y modificación de una región de interés (93)
- Creación y modificación de una región de interés (93)
- Análisis de las imágenes del portaobjetos (110)

Visualización de portaobjetos por separado

Puede visualizar dos portaobjetos de manera simultánea.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.





- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

Para visualizar dos portaobjetos por separado

- 1 Seleccione el portaobjetos que desee visualizar y, a continuación, pulse CTRL+clic en un segundo portaobjetos.
 - Se habilitará el botón **Split views** de la barra de menú Quick Action.

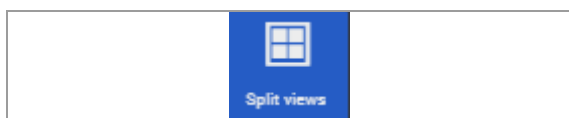

Farm. ROBERTA MILE MOZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A.C e.l.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

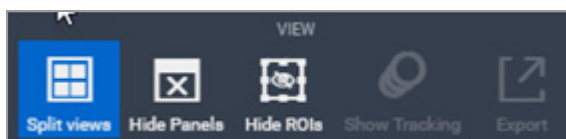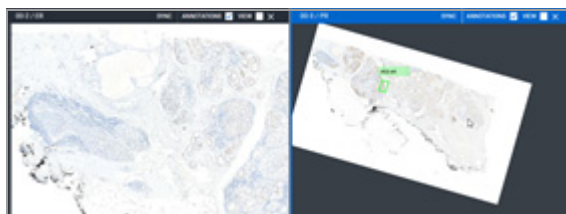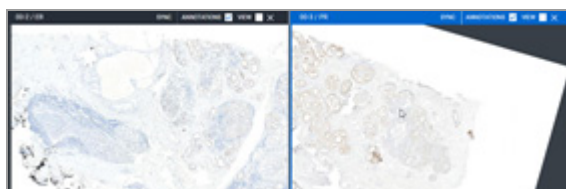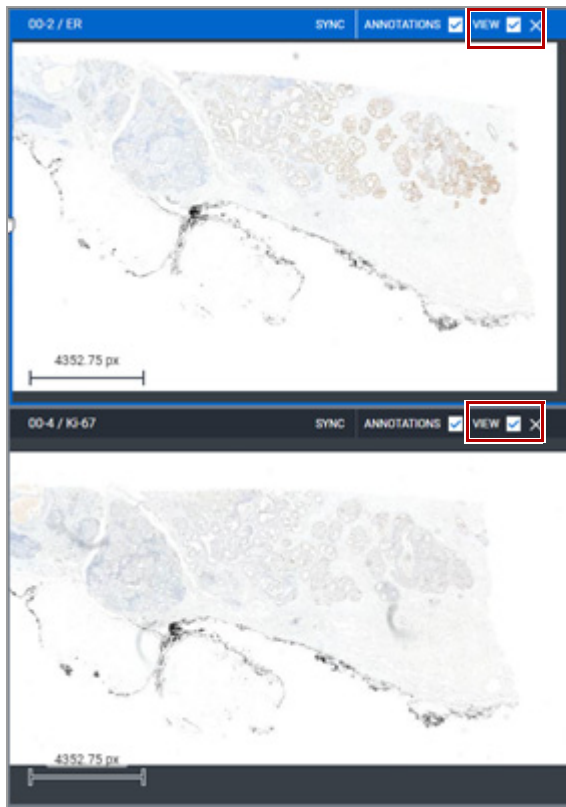

- 2 Seleccione el botón **Split views**.

→ Se amplían las dos imágenes y la principal (es decir, la del portaobjetos utilizado para el registro o la del primer portaobjetos seleccionado) tendrá un indicador azul en la parte superior.

- 3 Para desplazarse de forma independiente por las imágenes, desmarque la casilla de verificación **SYNC VIEW** en ambas imágenes.

- 4 Para mover una de las imágenes, haga clic en ella y arrástrela hasta la posición deseada.

- 5 Para ampliar o reducir, haga clic en la imagen y utilice la rueda del ratón.

❶ El panel **ZOOM** se aplicará únicamente a la imagen principal.

- 6 Vuelva a seleccionar el botón **Split views** para eliminar la vista dividida y volver a ver todos los portaobjetos en el área principal de visualización.

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCI. LOS ROCHE S.A. e I.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Temas relacionados

- Lista de atajos del teclado (50)
- Revisión y cualificación de los portaobjetos (86)
- Creación y modificación de una región de interés (93)
- Análisis de las imágenes del portaobjetos (110)

Rotación de las imágenes del portaobjetos

Puede rotar una imagen o realizar ajustes del color para mejorar su calidad.

Se pueden ajustar los siguientes atributos de color:

- Matiz: tinte de color (por ejemplo, rojo, verde y azul)
- Saturación: intensidad del color o pureza; el 100 % de saturación significa que no se agrega gris al matiz.
- Brillo: brillo general
- Contraste
- Nitidez

Los ajustes pueden guardarse como predeterminados y aplicarse a portaobjetos de otros casos, guardarse como configuración por defecto para utilizarlos en todos los portaobjetos o aplicarse a todos los portaobjetos del caso actual.








Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para rotar una imagen (método 1)

- 1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, amplíelo.
 - Asegúrese de que la imagen está bien posicionada en el área principal de visualización para proporcionar el campo de visualización (FOV) deseado.
- Se habilitará el botón **Rotate** de la barra de menú Quick Action.

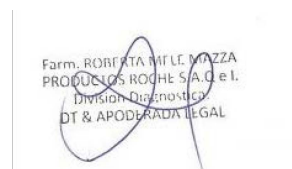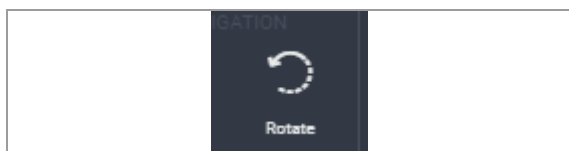

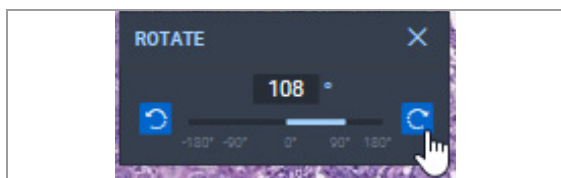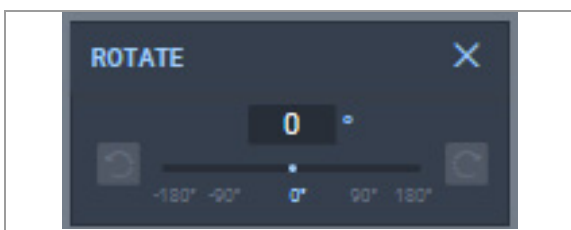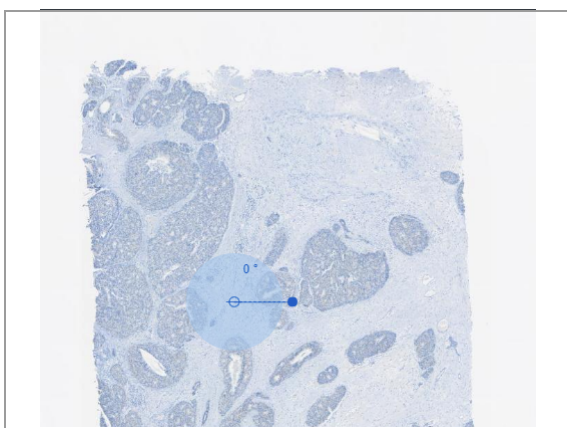

- 2 Seleccione el botón **Rotate**.
 - En el medio de la imagen aparece un icono de círculo provisto de un eje radial con un controlador en su extremo.

- 3 Mantenga pulsado el controlador y, a continuación, arrástrelo alrededor del círculo hasta que la imagen rote a la posición deseada.
 - Los grados de rotación se muestran al lado del eje radial.

- 4 Vuelva a seleccionar el botón **Rotate** para ocultar el icono de círculo.

► Para rotar una imagen (método 2)

- 1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, seleccione **VIEWER > ROTATE**.

- 2 Para rotar una imagen, realice cualquiera de las operaciones siguientes:
 - Seleccione el botón de rotación hacia la derecha o hacia la izquierda para rotar la imagen.
 - Mueva la barra del portaobjetos a la izquierda o a la derecha para rotar la imagen.
 - Introduzca un número comprendido entre -180 y +180 en el campo de rotación.
 - El icono de círculo muestra el grado de rotación.

Temas relacionados

- Lista de atajos del teclado (50)
- Revisión y cualificación de los portaobjetos (86)
- Creación y modificación de una región de interés (93)
- Análisis de las imágenes del portaobjetos (110)

Calibración del color del portaobjetos

Puede cambiar el color de la imagen del portaobjetos.






Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.






- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

Para calibrar el color del portaobjetos

- 1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, amplíelo.
 - Se habilitarán los botones del área **SETUP** de la barra de menú Quick Action.
- 2 Seleccione el botón **Calibration**.
 - Se muestra el cuadro de diálogo **Slide Color Calibration**.

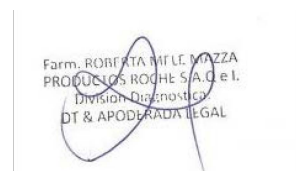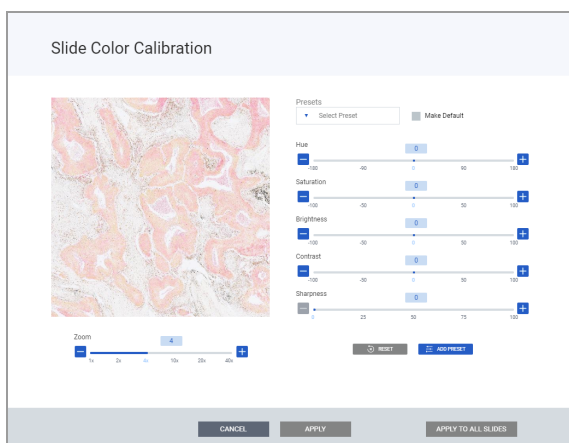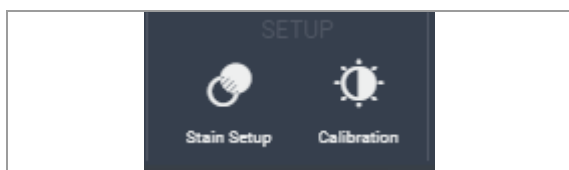

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
 PRODUCOS ROCHE S.A. S.r.l.
 Division Diagnostico
 DT & APODERADA LEGAL

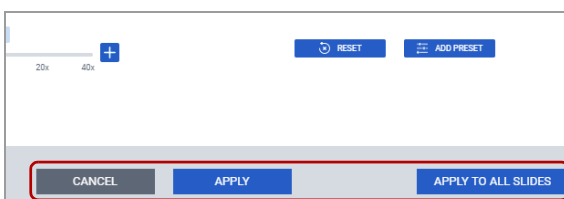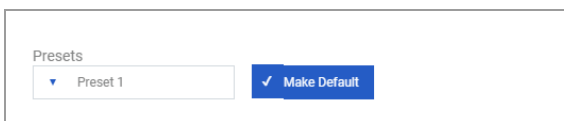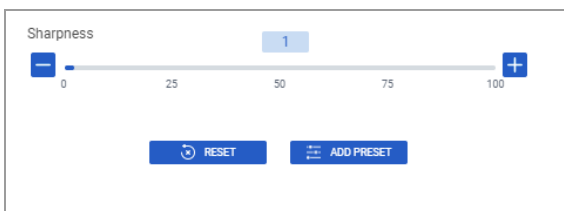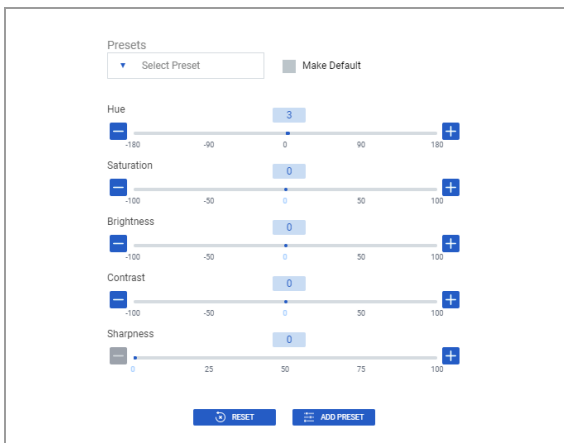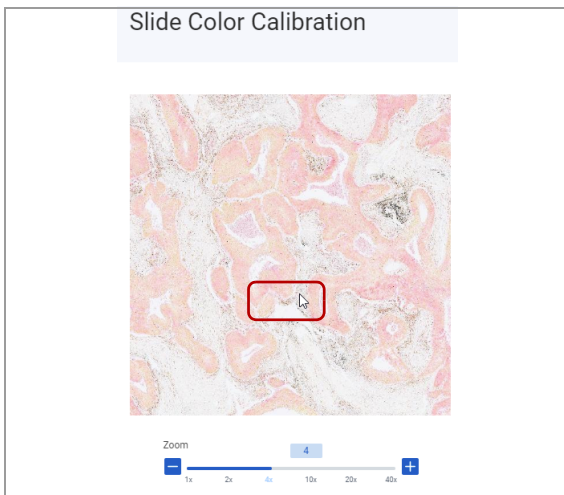

3 Seleccione la imagen en miniatura y, a continuación, arrástrela para mostrar el FOV deseado.

- Puede arrastrar la imagen para ajustar el FOV en cualquier momento.

4 Para ampliar la imagen en miniatura y ajustar la configuración de **Hue**, **Saturation**, **Brightness**, **Contrast**, o **Sharpness**, realice cualquiera de las operaciones siguientes:

- Utilice el control deslizante para ajustar la configuración.
- Utilice los botones + o - para aumentar o disminuir el valor.
- Introduzca un número en el campo correspondiente.

5 Seleccione el botón **ADD PRESET** para guardar los cambios para futuras aplicaciones.

- La nueva configuración predeterminada, Preset <#> se muestra en la lista desplegable **Presets**.

💡 Puede guardar la configuración predeterminada sin aplicarla a los portaobjetos del caso actual.

6 Seleccione la casilla de verificación **Make Default** para utilizar los ajustes predeterminados añadidos como configuración por defecto.

7 Para aplicar esta configuración, realice una de las operaciones siguientes:

- **APPLY**: aplique la configuración predeterminada al portaobjetos seleccionado.
- **APPLY TO ALL SLIDES**: aplique la configuración predeterminada a todos los portaobjetos del caso.

Temas relacionados

- Lista de atajos del teclado (50)
- Revisión y cualificación de los portaobjetos (86)
- Creación y modificación de una región de interés (93)
- Análisis de las imágenes del portaobjetos (110)

Aplicación de una calibración de color predeterminada a un portaobjetos

Puede aplicar una calibración de color predeterminada a la imagen del portaobjetos.






Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

Para aplicar una calibración de color predeterminada a un portaobjetos

- 1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, amplíelo.
 - Se habilitarán los botones del área **SETUP** de la barra de menú Quick Action.
- 2 Seleccione el botón **Calibration**.
 - Se muestra el cuadro de diálogo **Slide Color Calibration**.

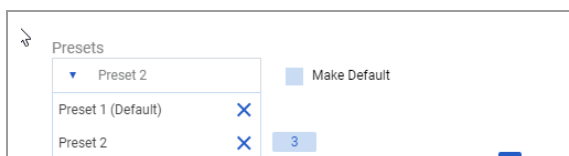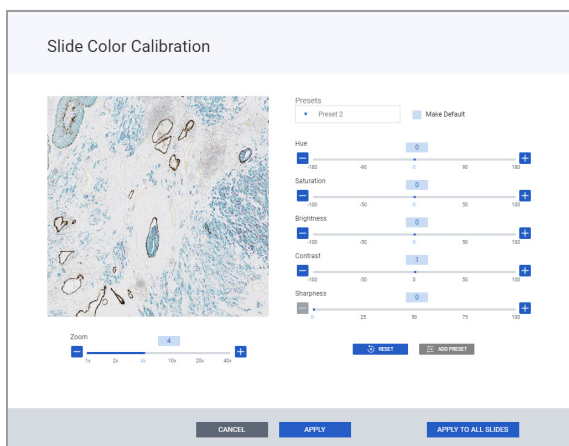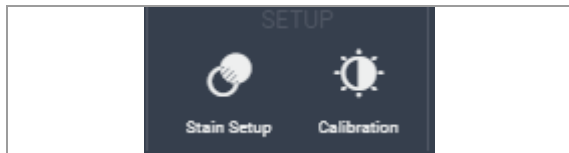

- 3 En la lista desplegable **Presets**, seleccione la configuración predeterminada.

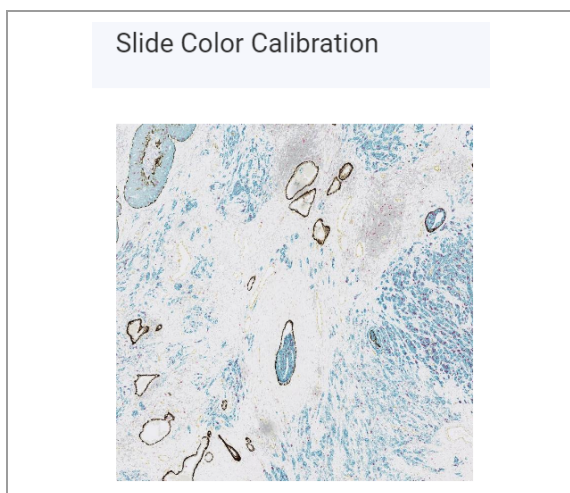

- 4 Revise la imagen en miniatura para comprobar que se ha seleccionado la configuración predeterminada correcta.
 - ❶ Cambie el FOV o el aumento, según sea necesario, para evaluar la configuración.
- 5 Para aplicar la configuración predeterminada, realice una de las operaciones siguientes:
 - **APPLY**: aplique la configuración predeterminada al portaobjetos seleccionado.
 - **APPLY TO ALL SLIDES**: aplique la configuración predeterminada a todos los portaobjetos del caso.
 - ❶ Aparecerá título bajo la imagen indicando que se ha realizado el ajuste de color.

Temas relacionados

- Lista de atajos del teclado (50)
- Revisión y cualificación de los portaobjetos (86)
- Creación y modificación de una región de interés (93)
- Análisis de las imágenes del portaobjetos (110)

Exportación de la imagen del portaobjetos o de una anotación

Puede exportar una imagen del portaobjetos o una anotación a .jpeg o .pdf para una consulta o revisión de patología.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **VIEWER** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para exportar un portaobjetos o anotación


- 1 Seleccione un portaobjetos y, a continuación, seleccione el botón **Export**.
 - Se muestra el cuadro de diálogo **Export**.



Farm. ROBERTA MILE MOZZA
 PRODUCI LOS ROCHE S.A. G.e I.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

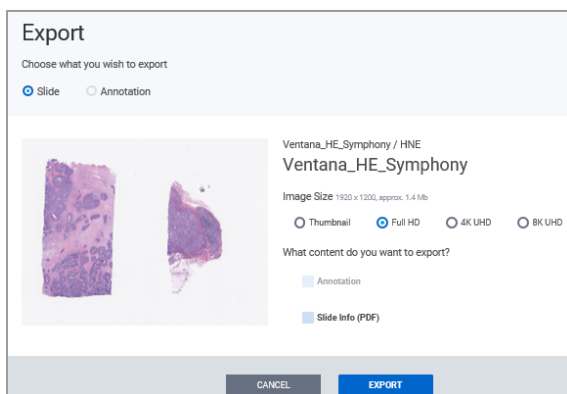


- 2 Para la opción **Choose what you want to export**, seleccione **Slide** o **Annotation**.

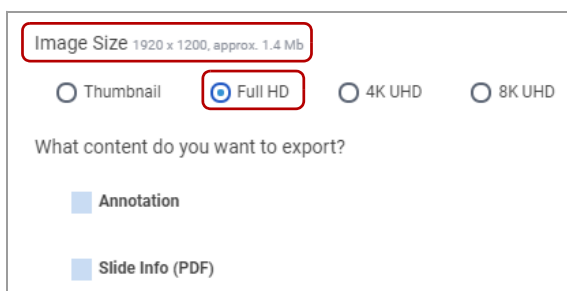

- 3 En la opción Image Size, seleccione la opción **Thumbnail**, **Full HD**, **4K UHD**, o **8K UHD**.

- ❶ Al seleccionar una opción, se muestran en el campo **Image Size** el tamaño de la imagen (ancho x alto en px) y el tamaño aproximado del archivo.

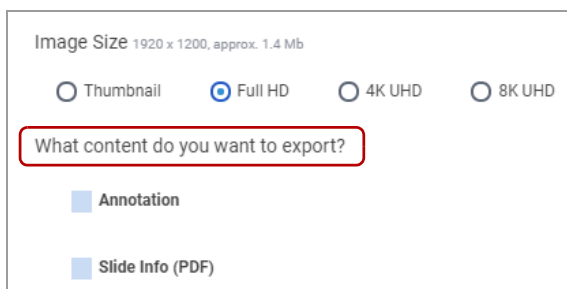


- 4 En el campo **What content do you want to export?**, seleccione **Annotation**, **Slide Info (PDF)** o ambas casillas de verificación.

- 5 Seleccione el botón **EXPORT** para completar esta acción.

- En función del tipo de archivo que haya elegido, se creará un .jpeg o .pdf, al que podrá acceder desde la carpeta de descargas de su sistema.

📖 Temas relacionados

- Lista de atajos del teclado (50)
- Revisión y cualificación de los portaobjetos (86)

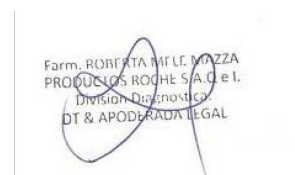

Consultas en los casos

Contenidos de esta sección

Reasignación de un caso (136)

Compartir un caso (138)

Solicitud de una segunda opinión (140)

Cancelación de una solicitud de segunda opinión (142)

Aceptación y rechazo de una solicitud de segunda opinión (143)

Reasignación de un caso

Se pueden compartir y reasignar casos entre patólogos del centro y entre patólogos cliente. Sin embargo, estas interacciones no se pueden dar entre un patólogo del centro y un patólogo cliente.

Cuando se reasigna un caso, el patólogo transfiere la posesión del caso a otro patólogo. El caso aparece en la lista de casos **ASSIGNED**.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para reasignar un caso

- 1 Seleccione **FOLDERS > Assigned**.

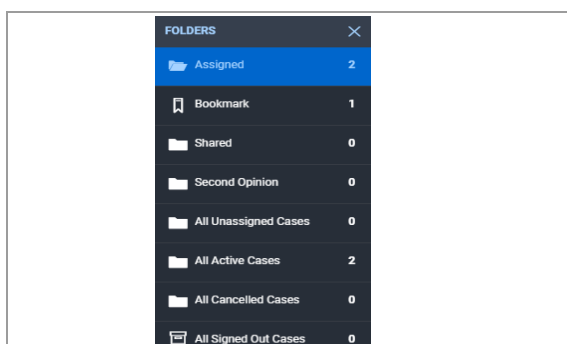

ASSIGNED You have 4 cases assigned to you

Received Date	Case ID	Patient	Age	Gender
Today	S19-61719-01	Sawyer, Emilia	79	F
Today	S19-80011901	Brown, Marianne	61	F
Today	S19-08081901	Tullson, James	41	M
07/23/2019	S19-7723119	Tullson, James	41	M

Reassign to ...

Search			
CJ	Chen, Joyce	Bos	Add
NN	Natho, Nancy	hematology	Add
MS	Matho, Susan	Bos	Add

Reassign Case

Case ID	Patient	Age/Gender	Primary Tissue
12448	Flynn, Janet	55/F	Breast

Will reassign to 1 person

CJ	Chen, Joyce	Bos	X
----	-------------	-----	---

Note

Enter the notes

Reassign to ...

Search

CANCEL DONE

Reassign Case

Case ID	Patient	Age/Gender	Primary Tissue
12448	Flynn, Janet	55/F	Breast

Will reassign to 1 person

CJ	Chen, Joyce	Bos	X
----	-------------	-----	---

Note

Enter the notes

Reassign to ...

Search

CANCEL DONE

2 Seleccione uno o varios casos y, a continuación, seleccione el botón **Re-Assign**.

3 Seleccione el campo de búsqueda **Reassign to...** para ver una lista de patólogos. Seleccione el patólogo al que desea reasignar el caso.

→ El nombre del patólogo se muestra en el campo **Will reassign to 1 person**.

4 Si se selecciona un patólogo incorrecto, haga clic en el icono de cerrar a la derecha del nombre y, a continuación, seleccione un patólogo distinto.

5 (Opcional) En el campo **Notes**, introduzca un comentario.

6 Seleccione el botón **DONE** para completar la reasignación.


→ **PATÓLOGO ORIGINAL**: se elimina el caso de la lista de casos ASSIGNED.

→ **PATÓLOGO AL QUE SE REASIGNA EL CASO**: recibe una notificación y el caso se muestra en su lista de casos ASSIGNED.

→ **PATÓLOGO AL QUE SE REASIGNA EL CASO**: puede ver el **CASE LOG** con todas las entradas anteriores del caso y una entrada nueva que detalla la información de reasignación.

Temas relacionados

- Asignación del estado URGENT a un caso (200)
- Acerca de la asignación de casos (161)
- Compartir un caso (138)
- Solicitud de una segunda opinión (140)

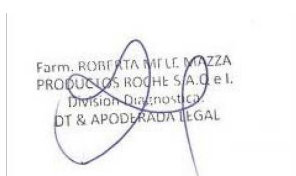

Compartir un caso

Se pueden compartir casos entre patólogos del centro y entre patólogos cliente. Sin embargo, un cliente del centro y un cliente patólogo no pueden compartir casos entre sí.

Cuando se comparte un caso, el segundo patólogo puede verlo, modificarlo o analizarlo. El caso compartido aparece en la lista de casos **SHARED**.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para compartir un caso

1 Seleccione **FOLDERS > Assigned**.

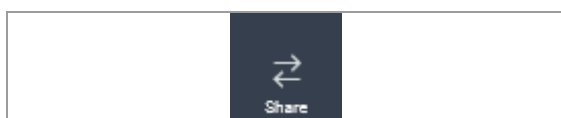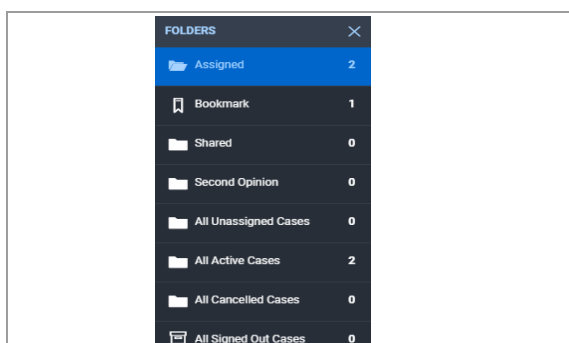

2 Seleccione el o los casos que desea compartir y, a continuación, seleccione el botón **Share**.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **Case Sharing**.


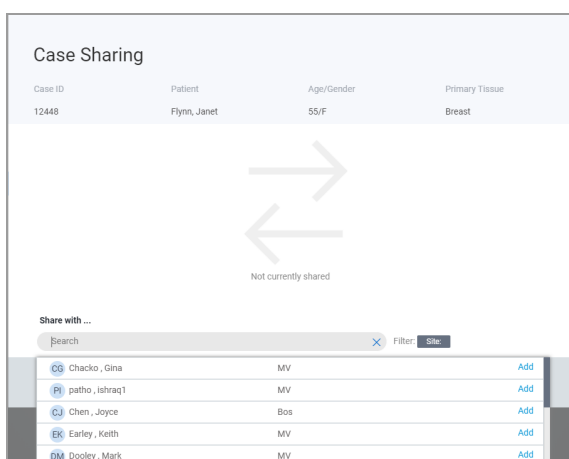


3 Seleccione el campo **Share with...** y, a continuación, seleccione al patólogo con el que desea compartir el caso.

→ El nombre del patólogo se muestra en el campo **Will share with <X> person**.

Puede compartir el caso con varios patólogos.

Farm. ROBERTA MFLI. MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

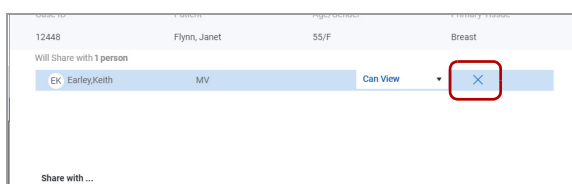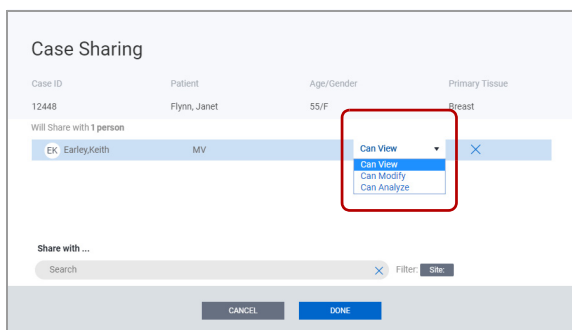

4 Revise la lista desplegable **Can View** y, si es necesario, cambie los permisos del patólogo con el que desea compartir el caso.

5 Si se selecciona un patólogo incorrecto, haga clic en el icono de cerrar a la derecha del nombre y, a continuación, seleccione un patólogo distinto.

6 Seleccione el botón **DONE** para completar la reasignación.

- **PATÓLOGO ASIGNADO:** el caso sigue en la lista de casos ASSIGNED y también se incluye en la lista de SHARED (by me) CASES.
- **COMPARTIDO CON EL PATÓLOGO:** el patólogo al que se compartió el caso recibirá una notificación, siempre y cuando así se haya configurado en **User Preferences**. El caso se mostrará en la lista SHARED (with me).
- **ASIGNADO y COMPARTIDO CON LOS PATÓLOGOS:** la información de **CASE LOG** estará disponible tanto para el patólogo asignado como para aquel al que se le ha compartido el caso. Se incluirá, además, una entrada para la solicitud de compartir.

Temas relacionados

- Asignación del estado URGENT a un caso (200)
- Acerca de la asignación de casos (161)
- Reasignación de un caso (136)
- Solicitud de una segunda opinión (140)

Solicitud de una segunda opinión

Un patólogo del centro puede solicitar una segunda opinión a un patólogo cliente o un patólogo especialista del centro. El patólogo cliente o especialista puede aceptar la solicitud y ver el caso o rechazarla. Se puede solicitar un máximo de cinco segundas opiniones por caso.

Cuando se solicita una segunda opinión, el caso aparece en la lista **SECOND OPINION** del cliente o del especialista. El cliente o especialista puede revisar el caso y cerrarlo. La segunda opinión se puede incluir en el informe cerrado. Los permisos de segunda opinión son similares a los de casos compartidos.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.


► Para solicitar una segunda opinión

1 Seleccione **FOLDERS > Assigned**.

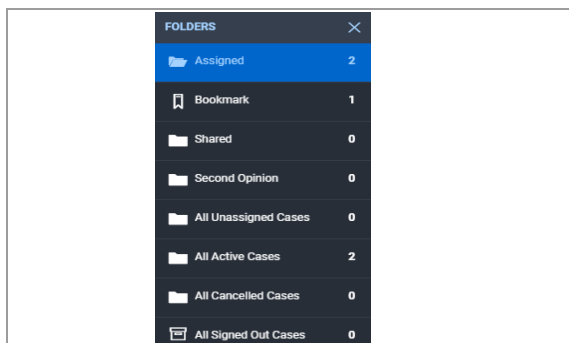

2 En la lista de casos **ASSIGNED**, seleccione el o los casos que desee enviar para una segunda opinión y, a continuación, seleccione el botón **2nd Opinion**.

→ Se muestra el cuadro de diálogo **Second Opinion Request**.

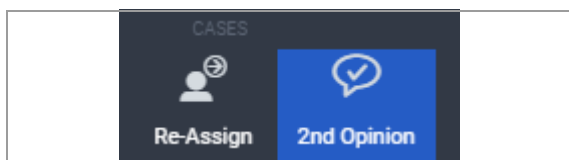

Farm. ROBERTA INFLE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A.C. e.l.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Second Opinion Request

Case ID	Patient Name	Age/Gender	Primary Tissue	Slides	
12371	Seary, James	0/M	Breast	1	<input type="checkbox"/> Anonymize Case

Choose to whom you want to request a 2nd opinion from.

Note:

Request 2nd Opinion from...

Search Filters:

Request 2nd Opinion from...

Search Filters:

CC	Citee, Cal	San Francisco Labs	<input type="button" value="Add"/>
MS	McDonald, Sam	ARUP laboratories	<input type="button" value="Add"/>
MS	McDonald, Sylvia	ARUP laboratories	<input type="button" value="Add"/>

Second Opinion Request

Case ID	Patient Name	Age/Gender	Primary Tissue	Slides	
12371	Seary, James	0/M	Breast	1	<input checked="" type="checkbox"/> Anonymize Case

Will request a 2nd opinion from...

MS McDonald, Sylvia ARUP laboratories

Note:

Request 2nd Opinion from...

Search Filters:

Second Opinion Request

Case ID	Patient Name	Age/Gender	Primary Tissue	Slides	
12371	Seary, James	0/M	Breast	1	<input checked="" type="checkbox"/> Anonymize Case

Will request a 2nd opinion from...

MS McDonald, Sylvia ARUP laboratories

Note:

Request 2nd Opinion from...

Search Filters:


3 (Opcional) Seleccione la casilla de verificación **Anonymize Case** para ocultar el nombre del paciente al patólogo que proporcione una segunda opinión.

4 Seleccione el campo de búsqueda **Request 2nd Opinion from...** y, a continuación, introduzca el nombre del cliente o la especialidad y pulse Intro.

5 Seleccione al patólogo para la segunda opinión.
→ El nombre del patólogo se muestra en el campo **Will request a 2nd opinion from...**

6 Si se selecciona un patólogo incorrecto, haga clic en el icono de cerrar a la derecha del nombre y, a continuación, seleccione un patólogo distinto.

7 (Opcional) En el campo **Notes**, introduzca un comentario.

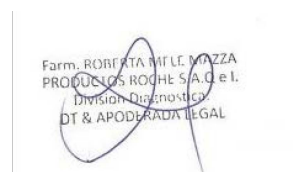

- 8 Seleccione el botón **SAVE** para completar la solicitud de una segunda opinión.
 - PATÓLOGO ASIGNADO: le llega una notificación en banner verde indicando que la solicitud de segunda opinión se tramitó correctamente; siempre y cuando se haya configurado en **User Preferences**.
 - PATÓLOGO ASIGNADO: el caso se incluirá tanto en la lista de casos ASSIGNED como en la lista de SECOND OPINION (sent).
 - PATÓLOGO QUE PROPORCIONA UNA SEGUNDA OPINIÓN: recibe una notificación acerca de la solicitud, siempre y cuando esté configurado en **User Preferences**, y el caso se muestra en la lista de SECOND OPINION (received).
 - PATÓLOGO ASIGNADO y PATÓLOGO QUE PROPORCIONA UNA SEGUNDA OPINIÓN: la información **CASE LOG** estará disponible tanto para el patólogo asignado como para aquel al que se ha solicitado una segunda opinión.

Temas relacionados

- Asignación del estado URGENT a un caso (200)
- Acerca de la asignación de casos (161)
- Reasignación de un caso (136)
- Compartir un caso (138)

Cancelación de una solicitud de segunda opinión

Puede cancelar la solicitud de una segunda opinión enviada a otro patólogo.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

Para cancelar una solicitud de segunda opinión

- 1 Seleccione **FOLDERS > Second Opinion**.
- 2 En la lista SECOND OPINION (sent), seleccione el caso para el que desea cancelar la segunda opinión.

SECOND OPINION (sent) You have requested 1 cases				
Received Date	Case ID	Patient	Age	Gender
Yesterday	S19-61719-01	Sawyer, Emilia	79	F

SECOND OPINION (received) You have received 0 cases			
Received Date	Case ID	Patient	Age

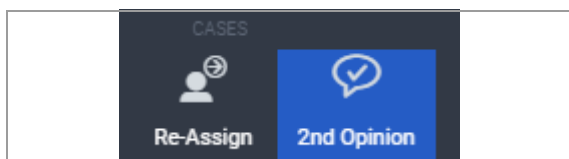

3 En la barra de menú Quick Action, seleccione el botón **2nd Opinion**.

→ Se muestra el cuadro de diálogo **Second Opinion Request**.

4 Seleccione el botón **CANCEL REQUEST**.

→ Se muestra el cuadro de diálogo **CANCEL SECOND OPINION?**.

💡 Utilice el botón **SAVE** si desea editar esta página pero no quiere cancelar la solicitud.

5 Seleccione **YES** para cancelar la segunda opinión.

→ La solicitud de segunda opinión se eliminará de su lista SECOND OPINION (sent) y de la lista SECOND OPINION (received) del patólogo al que se le solicita la segunda opinión.

📖 Temas relacionados

- Asignación del estado URGENT a un caso (200)
- Acerca de la asignación de casos (161)
- Reasignación de un caso (136)
- Compartir un caso (138)


Aceptación y rechazo de una solicitud de segunda opinión

Una patólogo del centro puede solicitar una segunda opinión a un patólogo cliente o un patólogo especialista del centro. El patólogo cliente o especialista puede aceptar la solicitud y ver el caso o rechazarla.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

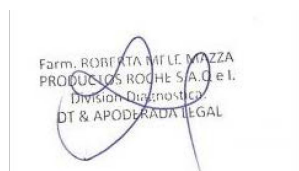

SECOND OPINION (sent) You have requested 0 cases					
Received Date	Case ID	Patient	Age	Gender	
SECOND OPINION (received) You have received 2 cases					
Received Date	Case ID	Patient	Age	Gender	
20-03-2018 da...	12375	Shane, Helen	49	F	<input checked="" type="checkbox"/>
Yesterday	12901	Eaton, Janie	74	F	<input type="checkbox"/>

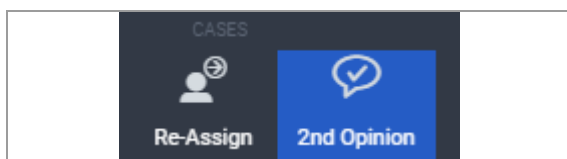

Second Opinion Request

Case ID	Patient Name	Age/Gender	Primary Tissue	Slides
2884	Shane, Helen	49/F	Breast	3

Requested by
R. Linda Bos

Note:

REJECT CANCEL GO TO CASE

► Para aceptar y rechazar una solicitud para una segunda opinión

- 1 Seleccione **FOLDERS > Second Opinion**.
- 2 En la lista SECOND OPINION (received), seleccione el caso que le han enviado para proporcionar una segunda opinión.
- 3 En la barra de menú Quick Action, seleccione el botón **2nd Opinion**.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **Second Opinion Request**.
- 4 (Opcional) En el campo **Note**, introduzca un comentario.
- 5 Realice una de las operaciones siguientes:
 - Seleccione el botón **REJECT** para rechazar la solicitud para una segunda opinión y, a continuación, seleccione **YES** en la notificación en banner azul.
 - Seleccione el botón **GO TO CASE** para aceptar y ver el caso.

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
PRODUCI LOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Producción y cierre de un informe

Contenidos de esta sección

- Adjuntar informes e imágenes externos a un caso (145)
- Apertura y visualización de archivos adjuntos (147)
- Modificación de archivos adjuntos existentes (148)
- Finalización de un caso (149)

Adjuntar informes e imágenes externos a un caso

Puede adjuntar imágenes e informes externos a un caso, tales como:

- Imágenes radiológicas
- Imágenes macroscópica/descripción
- Informes externos

Las imágenes pueden estar en formato .jpeg, .gif, .tiff, .png, o .bmp, y los informes en formato .doc, .docx, or .pdf.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para adjuntar informes e imágenes a un caso

1 Seleccione el caso de interés.

ASSIGNED		You have 3 cases assigned to you		
	Received...	Case ID	Patient	Age
<input type="checkbox"/>	Yesterday	12379	Downey, J...	50
<input checked="" type="checkbox"/>	Yesterday	12378	Seary, Ja...	0
<input type="checkbox"/>	Yesterday	12375	Shane, He...	49

2 Seleccione **CASES > ATTACHMENTS > Upload**.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **Upload Case Documents**.

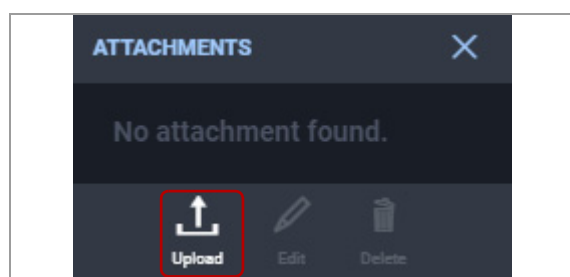

Upload Case Documents

Case ID: 12371 | Patient: Seary, James | Age/Gender: 0 / M | Primary Tissue: Breast


Gross Image/Description
 Radiology Images
 External Report
 Others

Image / Document *

Upload Document/Image
(.jpeg, .gif, .tiff, .png, .bmp)

Title/File Name *

Notes

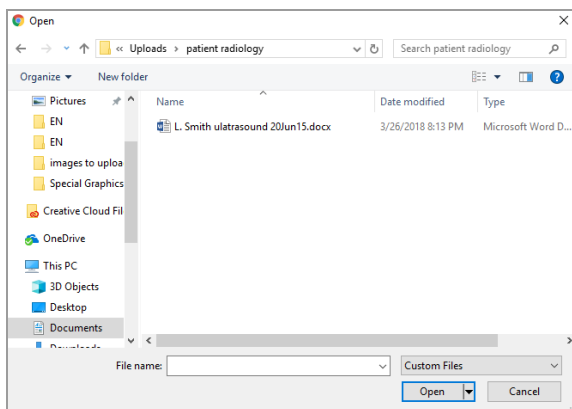

Title/File Name *

Helen_Shane_report

Notes

3 Seleccione el tipo de archivo que desee cargar y, a continuación, haga clic en **Upload Document/Image**.

→ Se muestra el cuadro de diálogo **Open**.

4 Navegue hasta el archivo de la imagen deseada y, a continuación, seleccione **Open**.

❶ Los formatos válidos para la imagen son .jpeg, .png, .gif o .bmp. Los formatos válidos para los documentos son .doc, .docx, o .pdf.

→ Se mostrará una miniatura del archivo cargado en el cuadro de diálogo **Upload Case Documents** del campo **Image/Document**, y se rellenará el nombre del archivo en el campo **Title/File Name**.

5 (Opcional) En el campo **Title/File Name**, introduzca un nombre para el archivo.

❶ El título predeterminado es el nombre de archivo del documento.

6 (Opcional) En el campo **Notes**, introduzca una nota.

7 En el cuadro de diálogo **Upload Case Documents**, seleccione el botón **UPLOAD**.

❶ Solo puede cargar un documento cada vez. En caso de que haya que cargar más archivos, repita este proceso.

→ A medida que se carga el archivo, se muestra una barra de progreso verde.

→ Cuando se completa la carga, se muestra la lista de casos y el icono de adjuntos del caso se destaca en azul, lo que indica que hay archivos adjuntos asociados al caso.

Temas relacionados

- Revisión y cualificación de los portaobjetos (86)
- Creación y modificación de una región de interés (93)
- Análisis de las imágenes del portaobjetos (110)

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Apertura y visualización de archivos adjuntos

Puede abrir los archivos de las imágenes o documentos externos adjuntados a un caso.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para abrir y visualizar archivos adjuntos

1 Seleccione el caso de interés.


ASSIGNED <small>You have 3 cases assigned to you</small>			
Received...	Case ID	Patient	Age
<input type="checkbox"/> Yesterday	12379	Downey, J...	50
<input checked="" type="checkbox"/> Yesterday	12378	Seary, Ja...	0
<input type="checkbox"/> Yesterday	12375	Shane, He...	49


2 Seleccione **CASES > Attachments**.

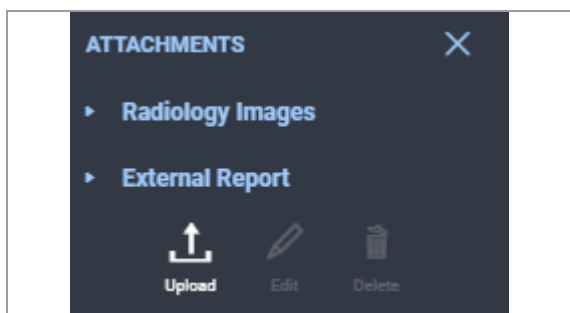

3 Abra la lista desplegable de la categoría de archivos adjuntos que le interese para visualizar los archivos adjuntos disponibles. Haga doble clic en el archivo que le interese abrir.

- Si el archivo que le interesa no está visible, utilice la barra de desplazamiento.

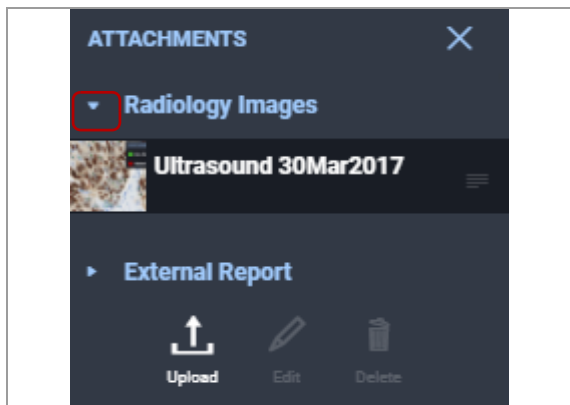

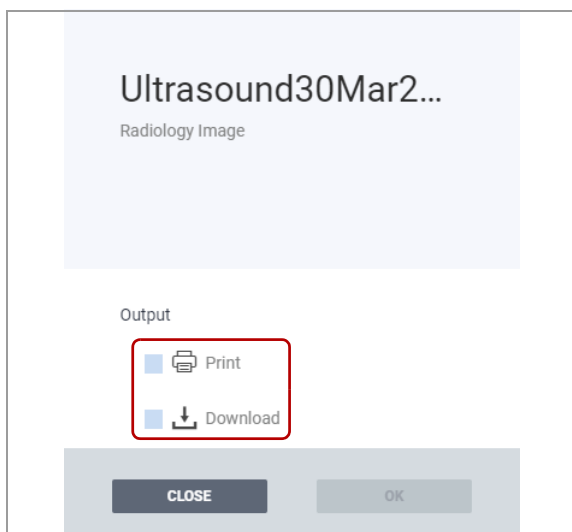

- 4 Para imprimir o descargar el archivo, seleccione **Print** o **Download** y, a continuación, haga clic en **OK**.

Modificación de archivos adjuntos existentes

Puede eliminar un archivo de imagen o un documento externo de un caso o añadir un archivo nuevo.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.



- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para modificar archivos adjuntos existentes

- 1 Seleccione el caso de interés.

ASSIGNED		You have 3 cases assigned to you		
Received...	Case ID	Patient	Age	
<input type="checkbox"/>	Yesterday	12379	Downey, J...	50
<input checked="" type="checkbox"/>	Yesterday	12378	Seary, Ja...	0
<input type="checkbox"/>	Yesterday	12375	Shane, He...	49

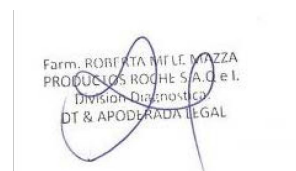

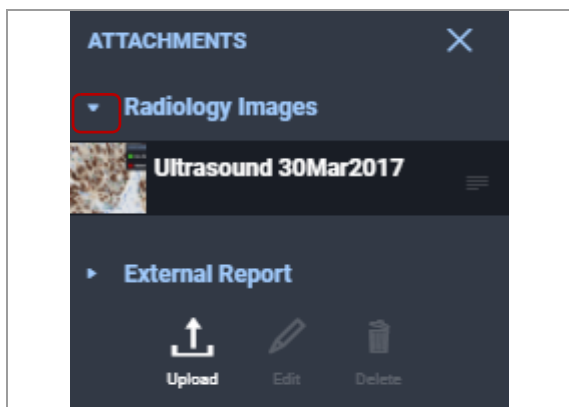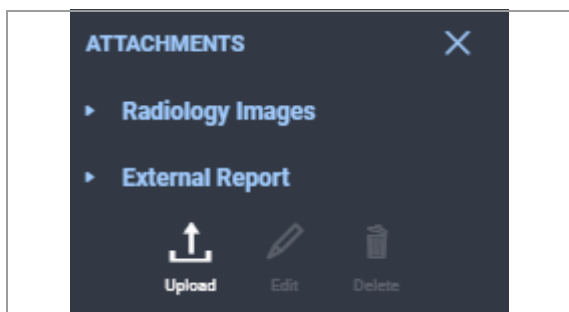

2 Seleccione **CASES > Attachments**.

3 Abra la lista desplegable de la categoría de archivos adjuntos que le interese para visualizar los archivos adjuntos disponibles y seleccione el archivo que desee editar.

- Si el archivo que le interesa no está visible, utilice la barra de desplazamiento.

→ Se habilitarán los botones **Edit** y **Delete**.

4 Para eliminar el archivo y completar el proceso, seleccione el botón **Delete**.

5 Para introducir un cambio en un archivo, haga lo siguiente:

- Seleccione el botón **Edit**.
- Realice los cambios pertinentes en el cuadro de diálogo **Upload Case Documents** y, a continuación, seleccione el botón **UPDATE**.

Finalización de un caso

Una vez finalizada la evaluación de un caso y la revisión de las imágenes del portaobjetos y los documentos asociados, puede completar el caso y cerrar el informe.

Contenidos de esta sección

Acerca de la conclusión de un caso (150)

Acerca de las plantillas de informe (151)

Selección de una plantilla de informe y revisión (152)

Creación y edición de comentarios predefinidos (154)

Eliminación de comentarios predefinidos (155)

Adición de comentarios predefinidos a un informe (156)

Revisar o editar la información de configuración de la tinción (157)

Cierre del informe (158)

Conservación de las imágenes (160)

Acerca de la conclusión de un caso

Para poder cerrar un caso deben haberse completado todas las acciones en curso. Una vez se ha cerrado y archivado un caso, puede volver a abrirlo para introducir una corrección (cambio administrativo), una enmienda (cambio en la opinión profesional) o un suplemento (solicitud de portaobjetos adicional).

Completar la revisión de un caso antes de cerrarlo

Antes de cerrar un caso se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Deben haberse examinado todos los portaobjetos asignados.
- Deben haberse puntuado todos los portaobjetos objeto de análisis.
- Deben haberse recibido, examinado y analizado (según corresponda) todos los portaobjetos con estado Pending.
- Deben haberse completado todas las solicitudes de portaobjetos y debe haberse examinado y puntuado cada una de ellas según corresponda.
- Se deberán haber excluido los portaobjetos rechazados.

Si no se cumplen estas condiciones, recibirá una notificación en banner rojo que le informará de las acciones que debe realizar antes de cerrar el informe.

Solicitudes de segunda opinión

Las solicitudes de segunda opinión pendientes no le impedirán cerrar el caso. En caso de que cierre el caso, se cancelarán las solicitudes de segundas opiniones pendientes.

Temas relacionados

- Reapertura de un caso (72)

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
 PRODUTOS ROCHE S.A. Q. e. L.
 División Diagnóstica
 DT & APODERADA LEGAL

Acerca de las plantillas de informe


Las plantillas de informe disponibles para su centro están configuradas por el administrador.

Este puede especificar el contenido y el título de cada sección, además de eliminar las secciones predeterminadas y añadir secciones personalizadas nuevas. Puede haber una plantilla específica para cada tipo de tejido o una sola para diferentes tejidos.

Puede modificar el título del informe, añadir comentarios y editar la configuración de la tinción.

A continuación, se presenta un ejemplo de las secciones que contiene un informe genérico.

Si falta cierta información en la documentación del caso, se genera el informe con el campo correspondiente vacío.

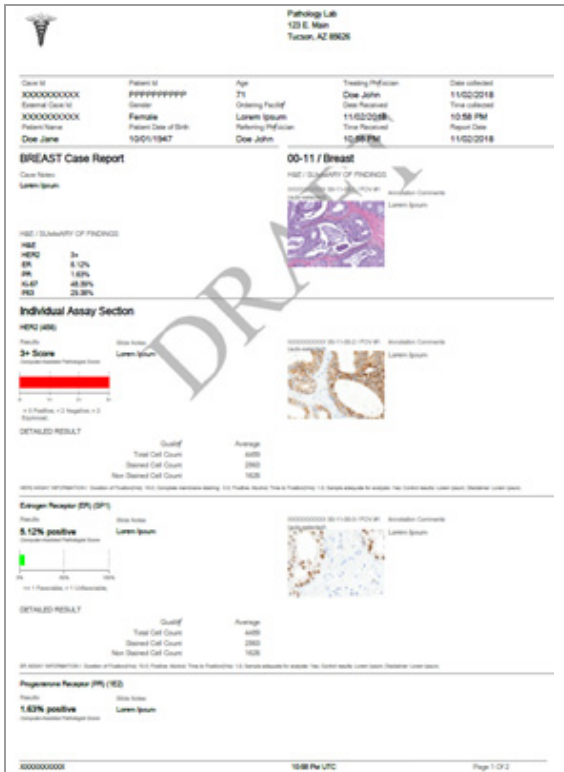

Opción del informe	Descripción
Encabezado	Puede contener el logo o la dirección
Información del caso	ID de caso externo
	Nombre del paciente (apellidos, nombre)
	ID del paciente
	Sexo
	Fecha de nacimiento del paciente
	Edad
	Centro solicitante
	Médico remitente
	Médico que trata al paciente
	Fecha de recepción
	Hora de recepción
	Fecha de recogida
	Hora de recogida
	Fecha de informe
	Ident. del caso
Sección del informe	Notas del caso, resumen de los resultados, región de interés (ROI) de la imagen de referencia. El administrador puede configurar la ROI de referencia para que sea ROI#1
Sección de ensayo individual	Puntuaciones (para cada portaobjetos), Notas de portaobjetos, imágenes de ROI, comentarios de ROI, Información de la configuración de tinción. Los resultados del ensayo utilizando el sistema VENTANA siempre incluyen los rangos de referencia.

☒ Secciones y campos disponibles para los informes


Opción del informe	Descripción
Imagen macroscópica y descripción	Imagen del tejido y descripción
Pie de página	ID del caso, fecha, hora y número de página
Bloque de firma	Logotipo, ID del caso, firma digital, firma impresa, fecha y hora, número de página, descargo de responsabilidad

☰ Secciones y campos disponibles para los informes

Selección de una plantilla de informe y revisión

Puede seleccionar una plantilla de informe y previsualizar el informe antes de cerrarlo.

La pantalla **REPORT** cuenta con dos paneles a los que se puede acceder desde la lista desplegable de la pestaña **REPORT** y con un botón en la barra de menú Quick Action. Los patólogos son los únicos que pueden ver esta pantalla.

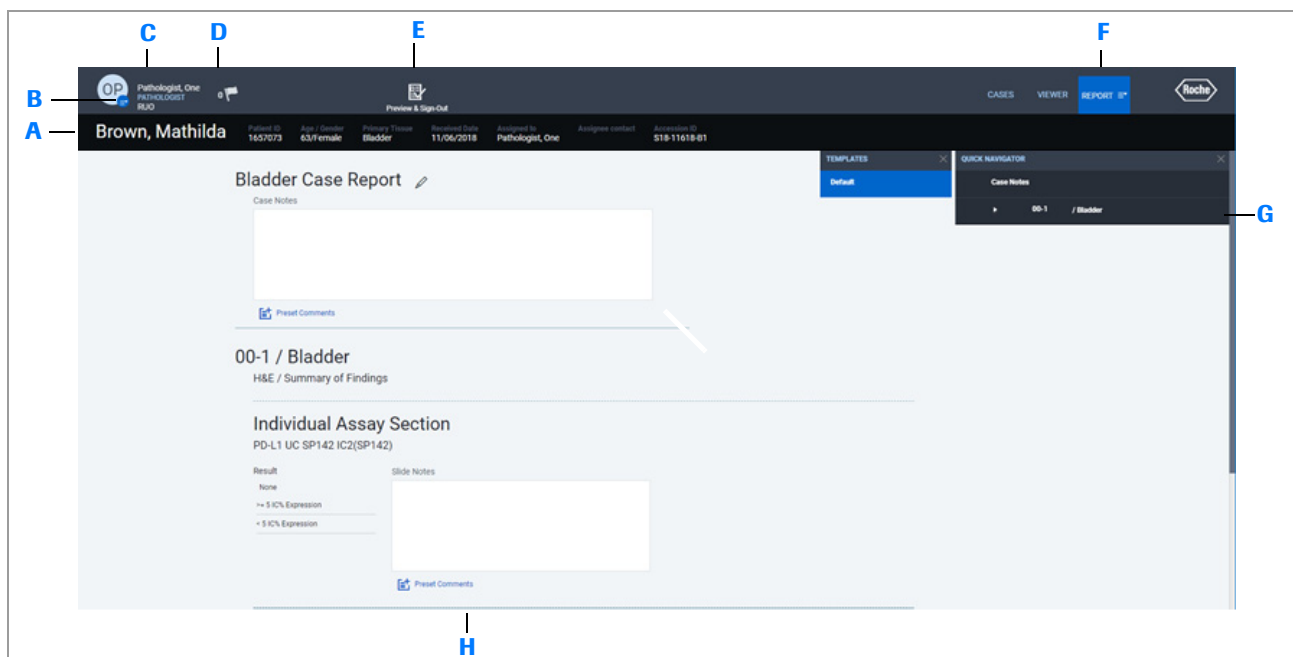

A Barra de identificación de paciente

B Botón **User Settings** para visualizar las opciones del menú de configuración de usuario

C Barra de menú Quick Action


D Botón **Preview & Sign-Out**

E Botón **Keep Images**

F Pestaña **REPORT** y lista desplegable

G Paneles

H Área principal de visualización con la plantilla del informe

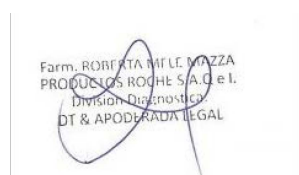

Una vez haya revisado el caso y cerrado el informe, solo podrá editarlo reabriendo el caso. Un caso puede reabrirse por tres razones:

- Para hacer una corrección.
- Para añadir portaobjetos (suplemento).
- Para corregir otra información importante (enmienda)




Cuando se finaliza un caso.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **REPORT** está abierta.
- Deben cumplirse estas condiciones para cerrar el caso.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para seleccionar una plantilla de informe y revisarlo (ejemplo)

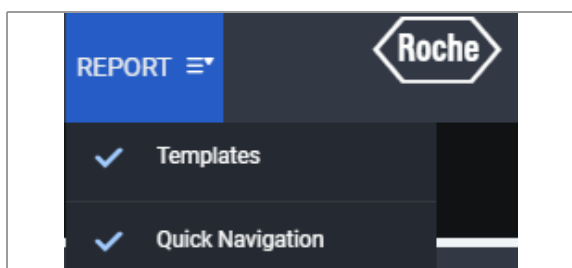


1 Seleccione **REPORT > Templates** y **Quick Navigation**.

→ Se abrirán ambos paneles.

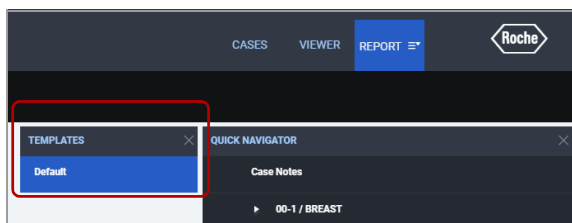



2 En el panel **TEMPLATES**, seleccione la plantilla de informe.

→ La plantilla se rellenará con la información del caso.

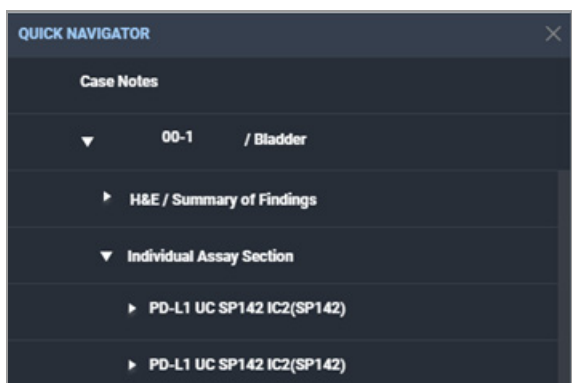

3 Utilice las listas desplegables de **QUICK NAVIGATOR** para localizar secciones específicas del informe y visualizarlas. También puede desplazarse por el informe para revisar cada sección.

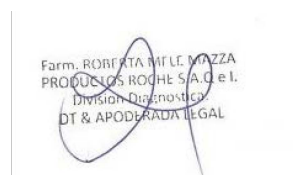

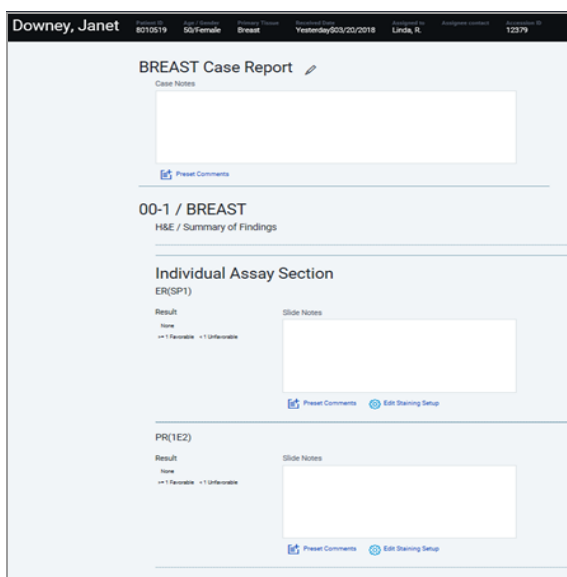

- 4 En el campo **Case Notes** de **Case Report**, o en el campo **Slide Notes** de **Individual Assay Section**, revise o introduzca comentarios o añada un comentario predefinido.
- 5 Para eliminar un comentario de los campos **Case Notes** o **Slide Notes**, seleccione y elimine la nota con el teclado.

Temas relacionados

- Creación y edición de comentarios predefinidos (154)
- Eliminación de comentarios predefinidos (155)
- Adición de comentarios predefinidos a un informe (156)

Creación y edición de comentarios predefinidos

Puede crear comentarios predefinidos y añadirlos al informe del caso. Es posible modificar los comentarios predefinidos cuando sea necesario.






Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **REPORT** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

Para crear y editar los comentarios predefinidos

- 1 En el campo **Case Notes**, **Slide Notes** o **Annotation Comments for Report**, seleccione el icono **Preset Comments**.
 - Se muestra el cuadro de diálogo **Preset Comments**.

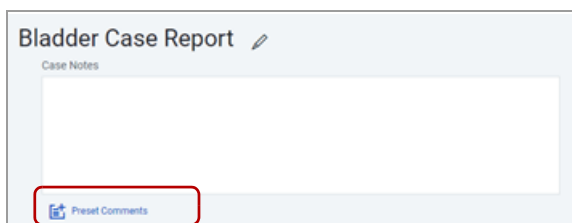

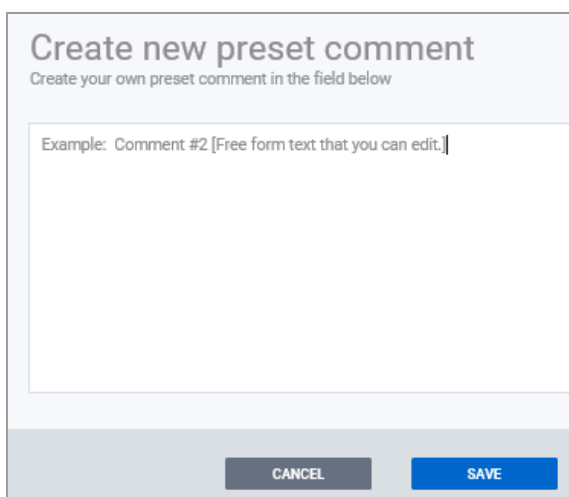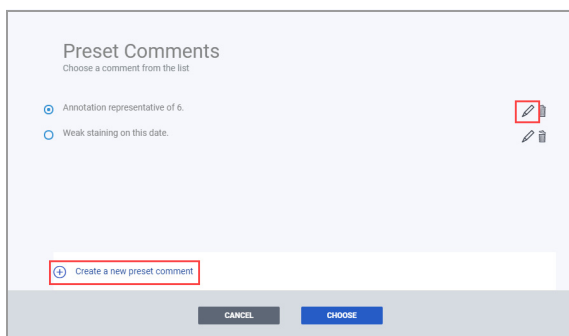

- 2 Elija una de las opciones siguientes:
 - El botón **Create a new preset comment**.
 - El icono de lápiz que aparece junto al comentario que desea editar.
 - ❶ Solo puede editar comentarios predefinidos creados por usted.
 - Se muestra el cuadro de diálogo **Create new preset comment**.
- 3 Introduzca o edite un comentario predefinido y, a continuación, seleccione el botón **SAVE**.
 - Se muestra el cuadro de diálogo **Preset Comments**.
- 4 Seleccione el botón **CHOOSE** para añadir el comentario al campo **Case Notes** o **Slide Notes** para el portaobjetos en el que creó el comentario predefinido.
 - El comentario predefinido que ha creado estará disponible para futuros informes.

Eliminación de comentarios predefinidos

Si desea eliminar un comentario predefinido, puede hacerlo desde el informe del caso.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **REPORT** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

▶ Para eliminar un comentario predefinido

- 1 En los campos **Case Notes**, **Slide Notes** o **Annotation Comments for Report**, seleccione el icono **Preset Comments** para editar el comentario predefinido.
 - Se muestra el cuadro de diálogo **Preset Comments**.

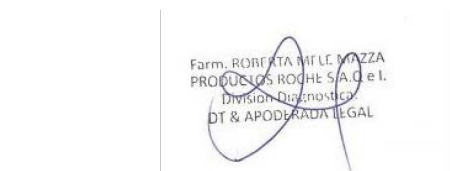

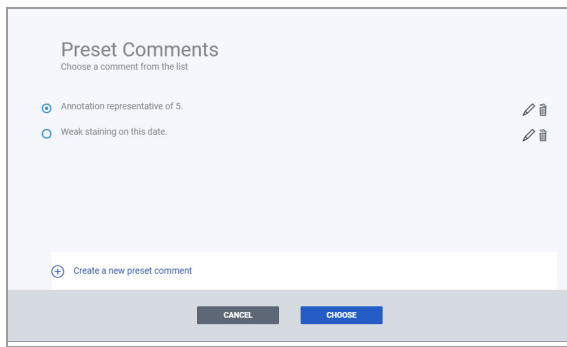

- 2 Seleccione el comentario que desee eliminar.
 - ❶ Solo puede eliminar comentarios predefinidos creados por usted.
- 3 Para eliminar el comentario, seleccione el icono de papelera situado al lado del comentario seleccionado.
 - Aparecerá una notificación en banner azul.
- 4 Seleccione **Yes** en la notificación en banner azul para eliminar el comentario.
 - El comentario se eliminará.

Adición de comentarios predefinidos a un informe

Puede añadir comentarios predefinidos al informe.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.



- La pantalla **REPORT** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para añadir un comentario predefinido


- 1 En los campos **Case Notes**, **Slide Notes** o **Annotation Comments for Report**, seleccione el icono **Preset Comments** para añadir un comentario predefinido.
 - Se muestra el cuadro de diálogo **Preset Comments**.



En la lista se incluyen los comentarios predefinidos de otros usuarios, como el administrador.

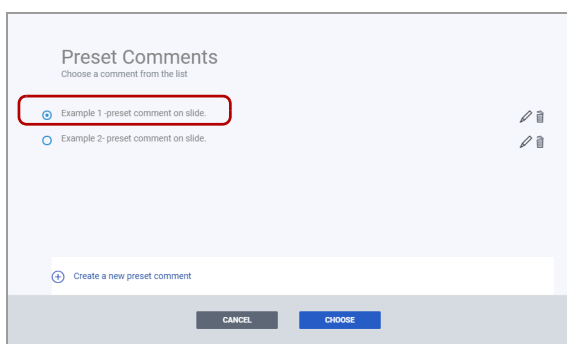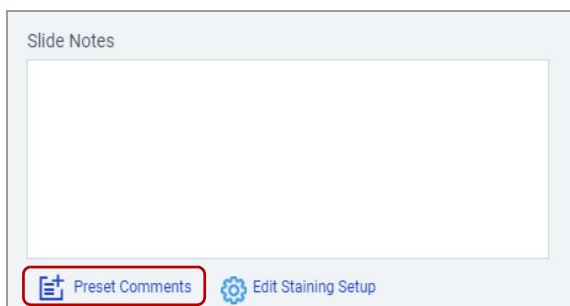

- 2 Seleccione el comentario que desee añadir.
 - ❶ La lista de comentarios predefinidos se rellena con los comentarios predefinidos que haya introducido y con los de otros usuarios.
- 3 Seleccione el botón **CHOOSE** para añadir un comentario.

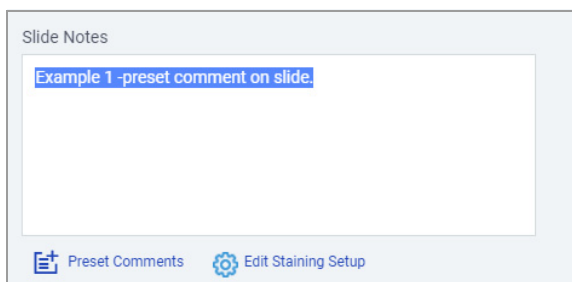

- Para eliminar el comentario predefinido que ha añadido, selecciónelo en la pantalla **REPORT** y elimínelo con su teclado.

Revisar o editar la información de configuración de la tinción

Puede revisar la información de configuración de la tinción introducida por el histotécnico. Si lo necesita, puede editar esta información.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **REPORT** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.



► Para revisar y editar la configuración de la tinción

- En la Individual Assay Section, seleccione **Edit Staining Setup** para un ensayo.

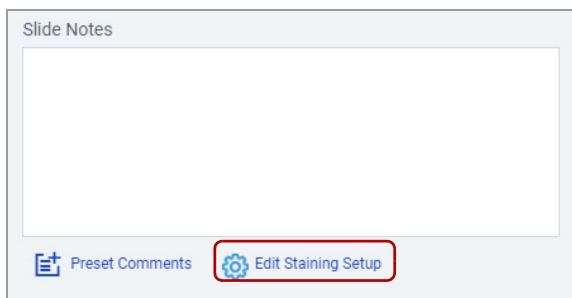

- Revise y edite la información del cuadro de diálogo **Stain Setup** según proceda.

- Repita este proceso para cada ensayo individual.
 - 1 El histotécnico introduce o proporciona la mayor parte de la información de **Stain Setup**.

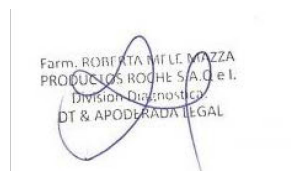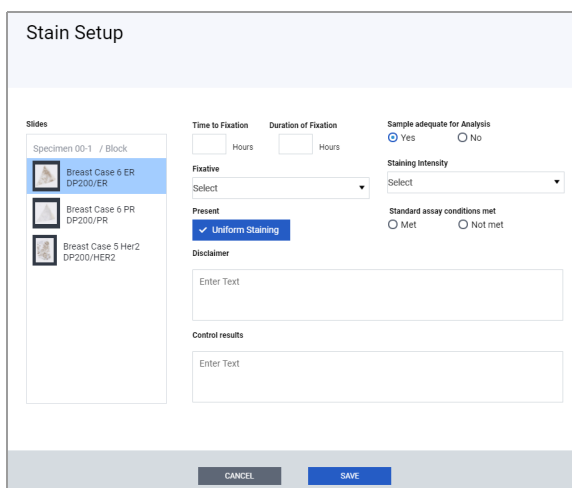

Cierre del informe

Una vez se hayan introducido los comentarios, puede previsualizar y cerrar el informe del caso.



Cuando se ha revisado un informe y se han finalizado todas las ediciones.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **REPORT** está abierta en el caso seleccionado.
- Se han cumplido todas las condiciones para cerrar el caso.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.


► Para salir del caso


1 En la barra de menú Quick Action, seleccione el botón **Preview & Sign-Out**.

→ Se mostrarán el cuadro de diálogo **Preview & Sign-Out** y un DRAFT del informe.


2 Revise el DRAFT del informe.

① Utilice las flechas de navegación de la página para previsualizar el informe completo.

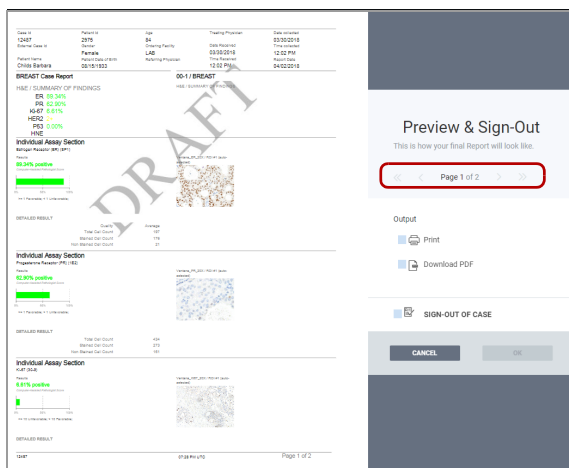

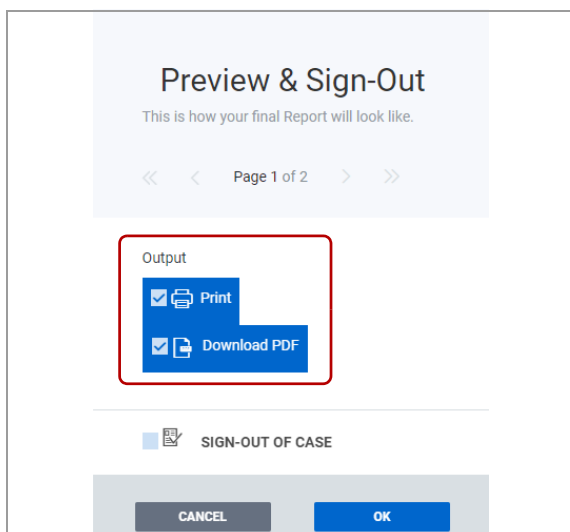


- 3 (Opcional) Desde la opción Output, seleccione **Print** y/o **Download PDF**.

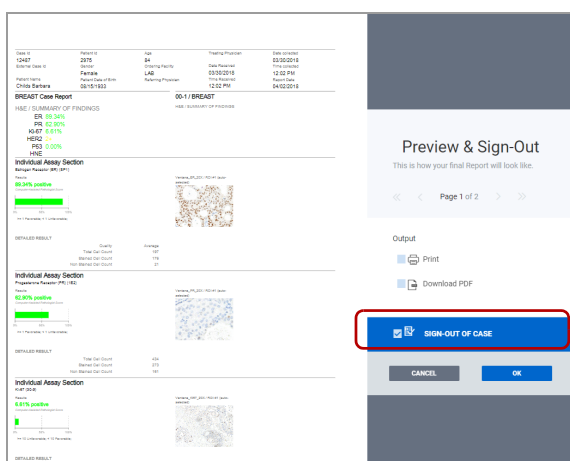

- 4 Seleccione la opción **SIGN-OUT OF CASE**.
→ La opción **SIGN-OUT OF CASE** se resalta en azul y se habilita el botón **OK**.


- 5 Seleccione el botón **OK** para salir del caso.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **Sign Out Case**.

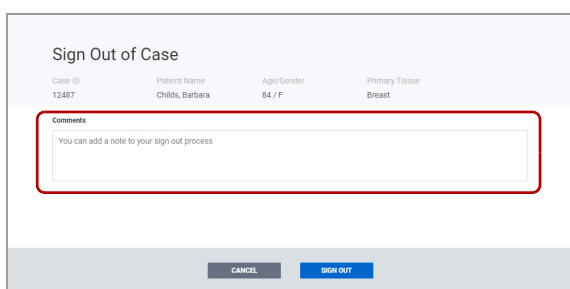

- 6 (Opcional) Introduzca un comentario.
❗ **IMPORTANTE:** Para realizar cambios en un caso cerrado tendrá que volver a abrirlo.

- 7 Seleccione el botón **SIGN OUT**.
→ El caso pasa de la lista **ASSIGNED** a la lista **ARCHIVED**.
→ Se muestra la lista **ARCHIVED CASES**.

💡 Se recomienda hacer una copia de seguridad de todos los informes que se generen.

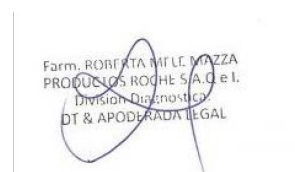

Conservación de las imágenes


En sus casos asignados puede decidir anular las reglas de eliminación y archivado de imágenes que ha establecido el administrador de uPath software.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **REPORT** está abierta en el caso seleccionado.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para conservar o no conservar las imágenes

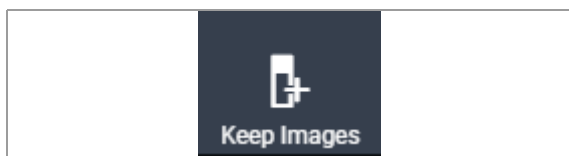

- 1** En la barra de menú Quick Action, seleccione el botón **Keep Images**.
 - uPath software anula las reglas de eliminación de imágenes y archivado que el administrador ha establecido.
- 2** Para eliminar la anulación de las reglas de eliminación de imágenes y archivado, seleccione el botón **Not Keep Images** de la barra de menú Quick Action.

Descripción general de las pantallas casos e imagen para los patólogos

Contenidos de esta sección

- Descripción general de la pantalla CASES (161)
- Descripción general de la pantalla VIEWER (164)
- Descripción general de la pantalla REPORT (182)

Descripción general de la pantalla CASES

Contenidos de esta sección

- Acerca de la asignación de casos (161)
- Acerca de los indicadores del estado del caso (163)

Acerca de la asignación de casos


Cuando se crea un caso, se muestra en la lista **ALL ACTIVE CASES**. Una vez se le haya asignado un caso, aparecerá en su lista de casos **ASSIGNED**.

Cómo entran los casos nuevos en su cola

Los casos entran en su cola una vez que se los asigne a sí mismo o que se los asignen a partir de una de las siguientes situaciones:

- Un histotécnico, un administrador, el coordinador del caso o el LIS le han asignado el caso.
- Un patólogo de su centro le ha reasignado el caso.
- En caso de que sea un cliente o un especialista, el caso se le ha asignado a partir de una solicitud de segunda opinión.

También pueden compartir con usted casos mediante una solicitud emitida por otro centro o un patólogo cliente.

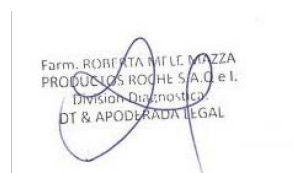


Notificación de casos nuevos

Recibirá notificaciones cuando se le asigne un caso nuevo o cuando un caso nuevo esté disponible para su asignación.

Puede escoger cómo recibir las notificaciones de los casos:


- Una notificación que se muestra con una bandera en la pantalla de flujo de trabajo que se conserva durante el periodo de tiempo que especifique.
- Una notificación en banner (conocida como indicación) que se muestra temporalmente después de que se produzca el evento.
- Un correo electrónico que se enviará a la dirección que especifique.

Notify me:	Notification	Toast	Email
When a new case is assigned	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
When a case is reassigned	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
When a case is shared with you	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
When you receive a second opinion request	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
When the second opinion request is complete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
When the second opinion request is canceled	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
When a slide re-scan or new slide request is fulfilled	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
When new unassigned case is added	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

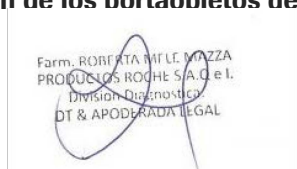Preparación de los portaobjetos del caso por el cliente

Los casos se clasifican en dos grupos:

- Casos que incluyen muestras preparadas en su centro y, en ocasiones, en centros vinculados, de muestras proporcionadas tanto por el médico que trata al paciente como por un patólogo externo (cliente).
- Casos asignados a patólogos clientes (independientemente del centro de tratamiento) de muestras preparadas en el centro en el que se trata el paciente. El patólogo cliente lleva a cabo un análisis y cierra el informe.

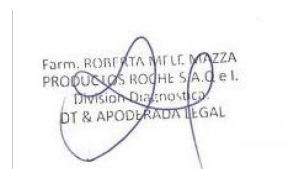

Acerca de los indicadores del estado del caso

Estado del ciclo de vida del caso

Case Status
In-Progress
In-Progress
In-Progress
In-Progress
Pending


Los indicadores del estado del caso le informan del estado del caso o de si se ha realizado algún cambio que debe revisar.

El ciclo de vida del caso se indica mediante Pending o In-Progress en la columna Case Status.

- Pending indica que un caso activo está a la espera de recibir los portaobjetos del caso del histotécnico o del LIS. El estado Pending en la lista **ALL ACTIVE CASES** puede indicar que no se ha asignado un patólogo al caso.
- In-Progress indica que el patólogo no ha cerrado el caso. Cuando se cierra un caso, pasa a la lista **ALL SIGNED OUT**.

La columna **Case Status** y el indicador del punto azul también están activos en las carpetas **Assigned**, **Bookmark**, **Shared** y **All Active Cases**.


Cambios en el caso

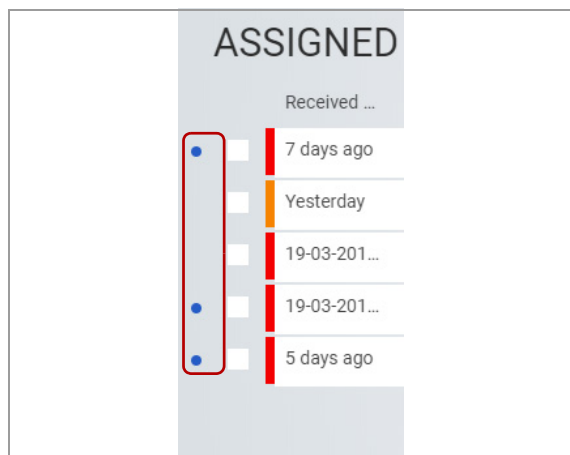

Para alertarle de que se han producido cambios en el caso, se muestra un punto azul en tres sitios.

- En la lista CASES, al lado de un caso.
- En el panel FOLDERS, al lado del número de casos.
- En la barra del menú de acción rápida, en la lista, al lado del icono indicador de notificaciones.

Asignación del caso

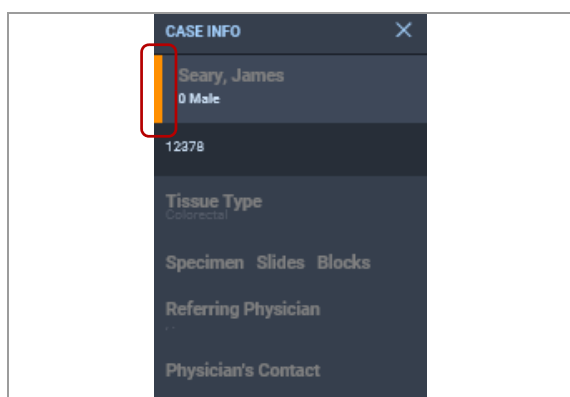

Para informarle del tiempo transcurrido desde que se asignó el caso se muestran unas barras indicadoras naranja y roja a mano izquierda de los casos en la lista CASES y en el panel CASE INFO.

Puede definir las barras codificadas por colores en **User Preferences**.

Estado del caso URGENT

URGENT					
You have 1 urgent cases					
Received ...	Case ID	Patient	Age	Gender	
5 days ago	12370	O'hara, Bri...	37	F	

ASSIGNED					
You have 6 cases assigned to you					
Received ...	Case ID	Patient	Age	Gender	
7 days ago	delete pat...	Searly, Ja...	0	M	

Los casos escritos en rojo indican que el estado es urgente. Todos los casos urgentes que se le han asignado se encuentran en una lista de casos URGENT independiente.

Descripción general de la pantalla VIEWER

Contenidos de esta sección

Acerca de la visualización de las imágenes del portaobjetos y de la información del paciente (164)

Acerca de la visualización de portaobjetos (167)

Acerca de los paneles del visor (170)

Acerca del movimiento por las imágenes de los portaobjetos y los paneles (171)

Acerca de los paneles SLIDE NAVIGATOR y ALL SLIDES (172)

Visión general de la anotación en el SLIDE PANEL y de las herramientas de análisis (174)

Acerca de los paneles CASE LOG, PATIENT HISTORY, NOTES, THUMBNAIL y SLIDE INFO (178)


Descripción general de la anotación y el análisis de imágenes (180)


Acerca de la visualización de las imágenes del portaobjetos y de la información del paciente

Para ver y analizar las muestras, utilice los botones de la barra de menú Quick Action y las opciones seleccionadas de la pantalla **VIEWER**.


Los botones se muestran con una fuente de color blanco intenso cuando están disponibles para la fase actual del proceso de análisis del portaobjetos.

Para que se activen los botones de la barra de menú Quick Action del área ANNOTATION, se debe seleccionar y ampliar un portaobjetos.

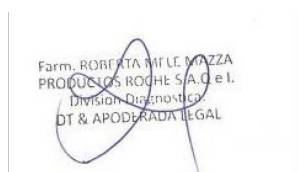

 El histotécnico también puede acceder a la pantalla **VIEWER**, pero no puede acceder a las funciones de análisis.

En las siguientes figuras se muestran la pantalla **VIEWER** y la barra de menú Quick Action.

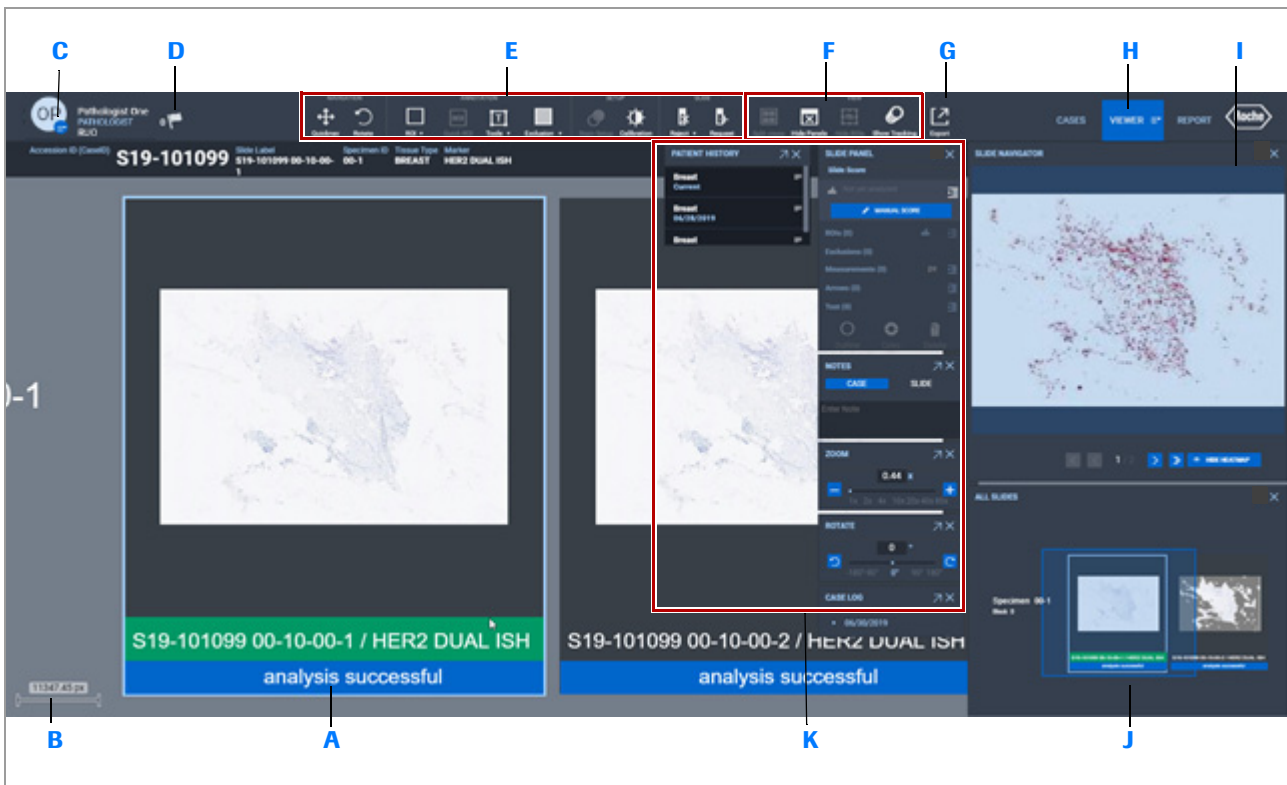


- | | | |
|---|---|--|
| <p>A Vea las imágenes del portaobjetos en el área principal de visualización.</p> <p>B Vea la medición en micrómetros y el aumento del portaobjetos</p> <p>C Seleccione el botón User Settings para ver opciones del menú para uPath, User Preferences o para De-Identify a un paciente.</p> <p>D Reciba notificaciones acerca de los casos</p> | <p>E Herramientas para el trabajo con imágenes de portaobjetos:
Navegación: desplácese por una imagen o rótela.
Anotación: cree regiones de interés (ROI) y realice mediciones.
Configuración: revise las notas sobre la tinción y calibre el color.
Portaobjetos: solicite la repetición del escaneado o excluya los portaobjetos.</p> <p>F Abra o vea los paneles de notas con los botones del área VIEW.</p> <p>G Envíe una nota o una imagen con el botón Export</p> | <p>I Visualice los portaobjetos en el panel SLIDE NAVIGATION</p> <p>J Seleccione portaobjetos del panel ALL SLIDES</p> <p>K Introduzca notas o modifique el aumento u orientación de la imagen en los paneles NOTES, ZOOM y ROTATE. Vea el tipo de tejido en el panel PATIENT HISTORY</p> |
|---|---|--|

Información del paciente y selección del portaobjetos

Cuando selecciona un portaobjetos, se muestran las barras de identificación del paciente y selección de portaobjetos.

- Al aumentar el zoom de la imagen del portaobjetos, se podría ocultar la barra de información del paciente.
- Cuando selecciona una categoría de portaobjetos, solo aparecen los portaobjetos de dicha categoría en el área principal de visualización.


En la siguiente figura se presentan las barras de identificación del paciente y de selección de portaobjetos. No incorpore información sobre la salud del paciente (PHI) en las etiquetas de la imagen ni en los archivos adjuntos. Convierta la PHI en anónima o desidentifíquela en la etiqueta de la imagen o en sus archivos adjuntos.

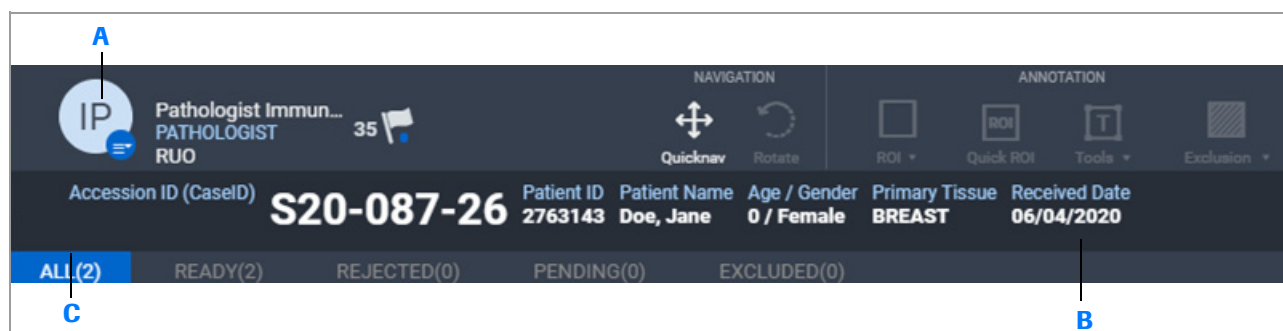

- A** Barra del menú superior o barra del menú Quick Action
- B** Vea la información del paciente y el número de caso de los portaobjetos que se están evaluando
- C** Vea categorías específicas asignadas a los portaobjetos asociados con el caso


Temas relacionados

- Apertura y visualización de los paneles en la lista CASES (50)
- Acerca del movimiento por las imágenes de los portaobjetos y los paneles (171)

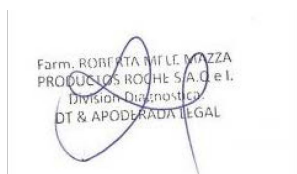

Acerca de la visualización de portaobjetos

Cuando abre la pantalla **VIEWER** de un caso, se muestran las imágenes reducidas de todos los portaobjetos del caso clasificadas en función de la muestra. La etiqueta del portaobjetos se incluye en la parte inferior de cada imagen.

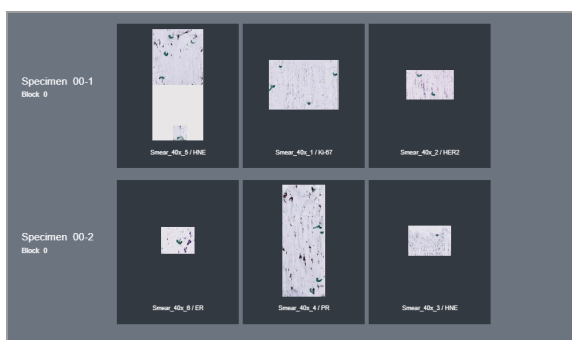

Para evaluar, anotar o analizar un portaobjetos, utilice el ratón para ampliar la imagen.

Una vez haya seleccionado un portaobjetos y haya ampliado la imagen, se activan las funciones de anotación de la barra de menú Quick Action, además de algunos paneles que no estaban disponibles previamente.


Utilice los botones de la barra de menú Quick Action para ver las imágenes de los portaobjetos.








Opción	Función
	Deslizamiento automático por la pantalla.
	Rotación de la pantalla.
	Utilícela junto con el SLIDE NAVIGATOR para hacer un seguimiento de las áreas en el tejido visualizado.
	Utilícela para calibrar el color para una mejora del refinamiento de la imagen.
	Utilícela para ver de dos a seis portaobjetos simultáneamente. El sistema puede registrar automáticamente hasta 6 portaobjetos. Hay disponible una opción que permite registrar imágenes antes de utilizar esta opción.

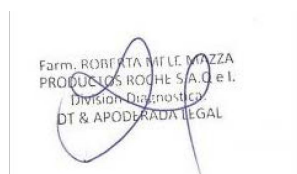☰ Opciones asociadas con la visualización de portaobjetos

Etiquetado del estado del portaobjetos




A medida que avanza en el flujo de trabajo, las etiquetas con códigos de color y mensajes de estado indican el estado de visualización de cada portaobjetos.



Color	Fase: tipo de estado
	Fallo/error/cancelado: análisis
	Escaneado repetido:procesamiento de imagen o Excluido: excluido del informe
	Revisado: inspección
	Análisis correcto: análisis y/o IVD: normativo
	Análisis correcto: análisis y/o RUO: normativo
	Fase inicial: ID de portaobjetos con formato, imagen de escáner VENTANA o no VENTANA
	En proceso


Descripción del código de color de los resultados de portaobjetos

Ejemplos de imágenes de portaobjetos que indican la fase en la que se encuentran en ese momento y el tipo de estado con etiquetado y código de color. Los portaobjetos pueden tener varias etiquetas en función de su estado.

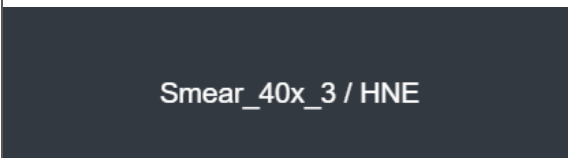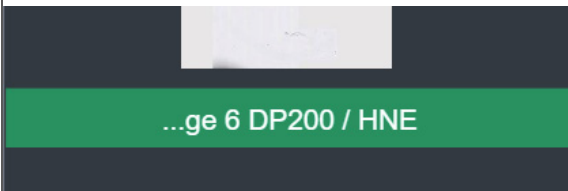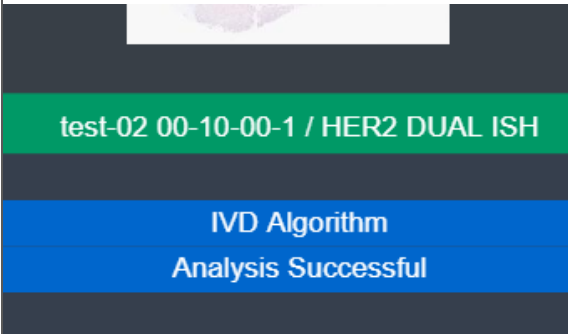Color	Estado
	No se ha seleccionado ningún portaobjetos para su visualización.
	Se ha seleccionado un portaobjetos para su visualización.
	El análisis del portaobjetos se ha llevado a cabo correctamente mediante el algoritmo de IVD (para uso en el diagnóstico in vitro). También se suministra el algoritmo utilizado en el análisis.

Visualización del estado mediante códigos de color

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
 PRODUCOS ROCHÉ S.A. G.e.I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

Color	Estado
 <p data-bbox="236 392 670 425">SANTEST001 00-10-00-2 / HER2</p> <p data-bbox="319 481 582 571">RUO Algorithm Analysis Successful</p>	<p data-bbox="742 286 1437 398">El análisis del portaobjetos se ha llevado a cabo mediante el algoritmo RUO (para uso exclusivo en investigación. No está indicado para utilizarse en procedimientos de diagnóstico). También se suministra el algoritmo utilizado en el análisis.</p>
 <p data-bbox="271 728 630 761">Case124 00-1 0-00-3 / H&E</p> <p data-bbox="327 907 574 940">Rescan Requested</p>	<p data-bbox="742 631 1356 687">Se ha solicitado la repetición del escaneado del portaobjetos visualizado y se va a reemplazar.</p>
 <p data-bbox="223 1131 678 1164">Colorectal Case 00-10-00-5 / MLH1</p> <p data-bbox="391 1310 510 1344">Excluded</p>	<p data-bbox="742 1012 1396 1046">El portaobjetos visualizado se ha excluido y no se va a reemplazar.</p>
<p data-bbox="223 1489 359 1523">STAINING</p> <p data-bbox="263 1657 319 1680">-- / ER</p>	<p data-bbox="742 1370 1437 1494">Cuando se solicita un portaobjetos nuevo o de sustitución, se incluye una plantilla de portaobjetos con las imágenes del portaobjetos en el área principal de visualización. La etiqueta de la plantilla de portaobjetos indica la tinción solicitada para el portaobjetos.</p>

Visualización del estado mediante códigos de color

Temas relacionados

- Apertura y visualización de los paneles en la lista CASES (50)
- Acerca del movimiento por las imágenes de los portaobjetos y los paneles (171)
- Acerca de los paneles SLIDE NAVIGATOR y ALL SLIDES (172)
- Visión general de la anotación en el SLIDE PANEL y de las herramientas de análisis (174)
- Acerca de los paneles CASE LOG, PATIENT HISTORY, NOTES, THUMBNAIL y SLIDE INFO (178)
- Apertura y cierre de los paneles del visor (78)
- Utilización de herramientas de análisis (117)

Acerca de los paneles del visor

En la pestaña **VIEWER**, puede mostrar u ocultar los paneles o utilizar los atajos del teclado para abrir un panel.




Los paneles proporcionan acceso a la información del paciente, del caso y del portaobjetos. Los paneles se activan en la evaluación y el análisis de los portaobjetos.

💡 Al moverse entre los portaobjetos de un caso, puede que algunos paneles que estaban abiertos y disponibles para un portaobjetos no lo estén para otros portaobjetos del caso.

Algunos paneles no se podrán abrir hasta que realice alguna de las siguientes acciones:

- Seleccionar un portaobjetos
- Seleccionar y ampliar un portaobjetos

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
 PRODUCOS ROCHE S.A. de I.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

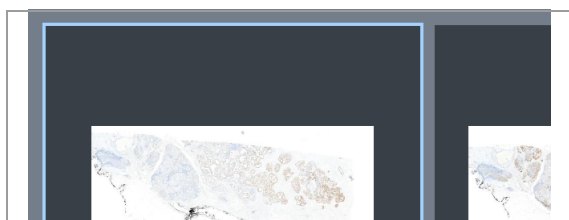

Cuando selecciona un portaobjetos, se distingue con un contorno azul.

Temas relacionados

- Acerca del movimiento por las imágenes de los portaobjetos y los paneles (171)
- Acerca de los paneles SLIDE NAVIGATOR y ALL SLIDES (172)
- Visión general de la anotación en el SLIDE PANEL y de las herramientas de análisis (174)
- Acerca de los paneles CASE LOG, PATIENT HISTORY, NOTES, THUMBNAIL y SLIDE INFO (178)
- Apertura y cierre de los paneles del visor (78)
- Utilización de herramientas de análisis (117)


Acerca del movimiento por las imágenes de los portaobjetos y los paneles


Se puede mover una imagen de un portaobjetos para optimizar la visualización de la información del portaobjetos.

Ubicación, ampliación y rotación de la imagen

Las imágenes del portaobjetos se pueden mover y ampliar hasta 40X y rotarlas a 180 grados. Se pueden registrar y visualizar de dos a seis portaobjetos simultáneamente. El sistema puede registrar automáticamente hasta 6 portaobjetos.

Cierre de paneles

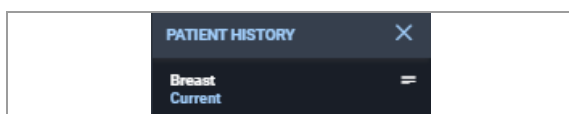

Para cerrar un único panel, utilice el botón  o bórrelo de la pestaña **VIEWER**.



Para cerrar todos los paneles, seleccione el botón de alternar **Hide Panels/Show Panels** en la barra de menú Quick Action.

Temas relacionados


- Acerca de los paneles SLIDE NAVIGATOR y ALL SLIDES (172)
- Visión general de la anotación en el SLIDE PANEL y de las herramientas de análisis (174)
- Acerca de los paneles CASE LOG, PATIENT HISTORY, NOTES, THUMBNAIL y SLIDE INFO (178)
- Apertura y cierre de los paneles del visor (78)

Acerca de los paneles SLIDE NAVIGATOR y ALL SLIDES

El **SLIDE NAVIGATOR** muestra el portaobjetos que se ha seleccionado o bien en el área principal de visualización o en el panel **ALL SLIDES** que se describe a continuación.

Utilice las flechas de navegación para seleccionar un portaobjetos distinto y moverlo al área visible del área principal de visualización.

Cuando selecciona ampliar un portaobjetos, el cuadro de enfoque azul de la imagen en miniatura del **SLIDE NAVIGATOR** indica la ubicación del campo de visión (FOV) de la imagen escaneada.

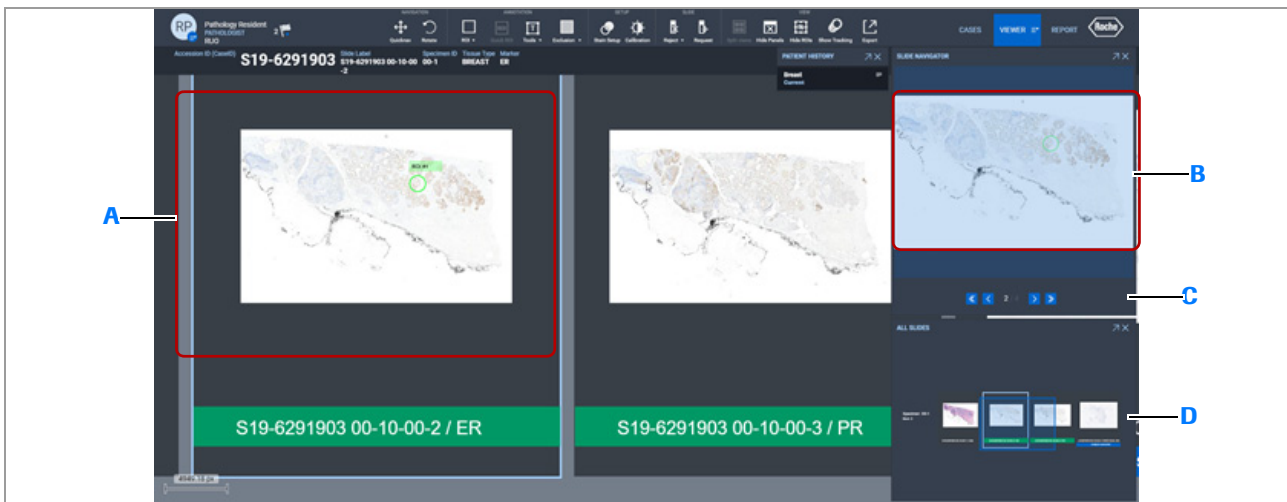

A Portaobjetos seleccionado en el área principal de visualización con parte de la imagen fuera del FOV.


B Panel **SLIDE NAVIGATION** que muestra la imagen completa del portaobjetos seleccionado y el FOV definido por el cuadro de enfoque.

C Utilice las flechas de navegación para seleccionar el siguiente portaobjetos y visualizarlo en el área principal de visualización. Si se ha analizado el portaobjetos con un algoritmo que incluya un mapa térmico, este se presenta superpuesto.

D Panel **ALL SLIDES** que muestra las miniaturas de los portaobjetos disponibles para su visualización en el área principal de visualización.

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
 PRODUTTORES ROCHE S.A. e I.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Uso de mapas térmicos

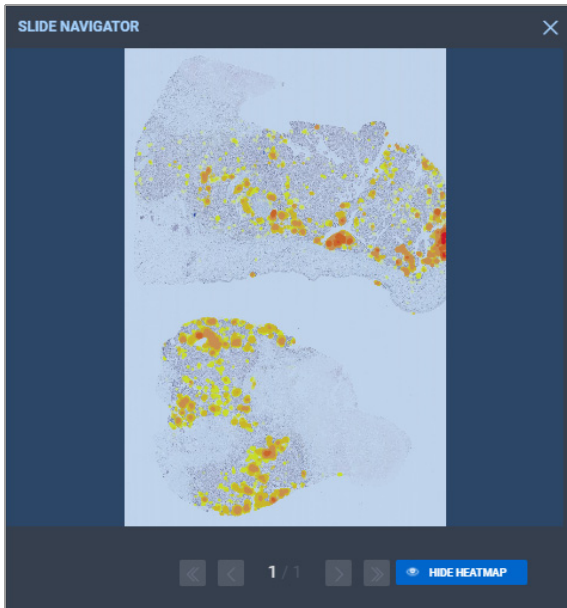

En el panel **SLIDE NAVIGATOR** es posible mostrar y ocultar el mapa térmico si el logaritmo utilizado para analizar el portaobjetos contenía un mapa térmico.

- Seleccione el botón **SHOW HEATMAP** para ver el mapa térmico en la imagen del portaobjetos. El ajuste predeterminado muestra siempre el mapa térmico si está disponible.
- Seleccione el botón **HIDE HEATMAP** para eliminar el mapa térmico de la vista de la imagen del portaobjetos.

El mapa térmico es una herramienta de navegación específica del algoritmo que se ha utilizado durante el análisis. Aunque se muestre el mapa térmico, el usuario debe revisar la imagen como si se tratara de una lectura manual.

Para obtener más información, consulte la guía del algoritmo.


Temas relacionados

- Aumento de imágenes del portaobjetos (118)
- Visualización de un nivel de enfoque para los portaobjetos escaneados (120)
- Seguimiento de la visualización del portaobjetos (121)


Visión general de la anotación en el SLIDE PANEL y de las herramientas de análisis

Utilice **SLIDE PANEL** para ver las anotaciones y los resultados de análisis de la imagen seleccionada o para llevar a cabo un análisis.

La opción **SLIDE PANEL** pasa a estar disponible después de seleccionar y acercarse a una imagen en la pantalla **VIEWER**.

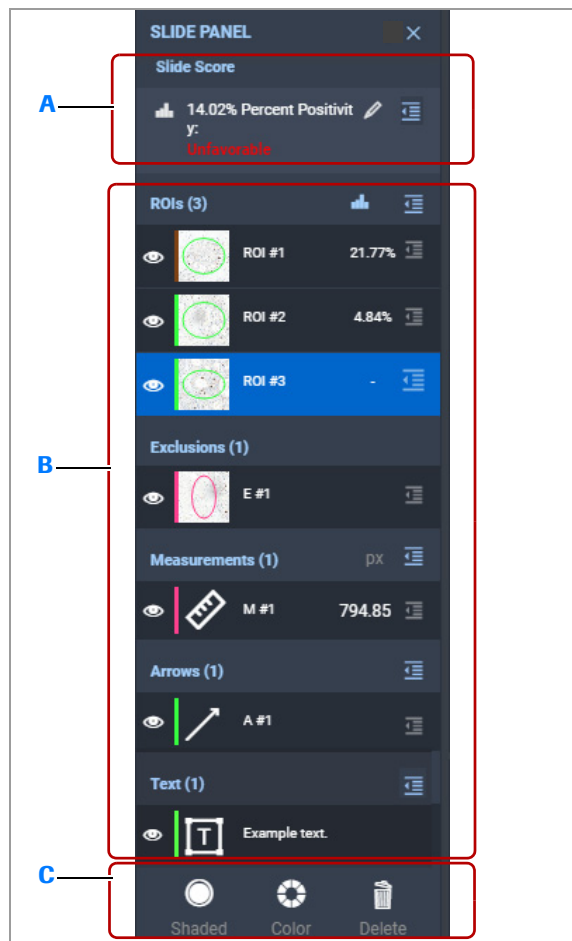


- A** Área de **Slide Score** **C** Área de funciones
B Área de anotación

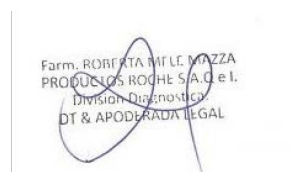


Anotaciones y resultados de los análisis

Puede ver las anotaciones y los resultados de puntuación del portaobjetos para cada región de interés (ROI).

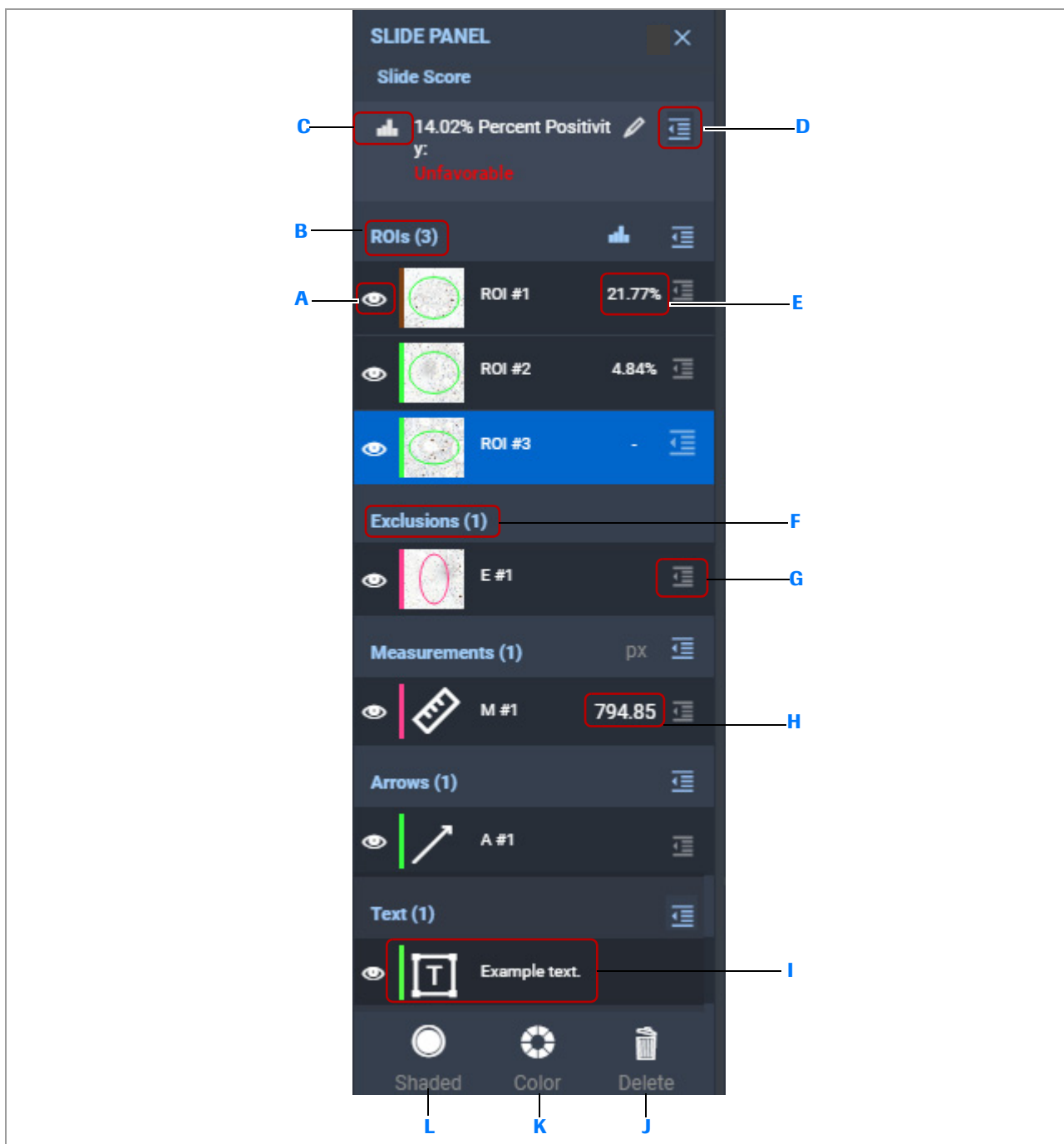


- | | |
|---|---|
| A Icono de mostrar y ocultar para ver la anotación en la imagen | G Icono desplegable que muestra el panel secundario con el botón Delete y el campo Comment |
| B Número de ROIs | H Métrica de las mediciones (px, cm o mm, en función de la configuración definida en las preferencias del usuario) |
| C Icono Analizar ROI | I Icono de texto para mostrar el panel secundario con el campo de texto |
| D Icono desplegable que muestra el panel Slide Score con los botones Edit y Clear. | J Quitar anotación de la imagen del portaobjetos |
| E Parámetro para ROI (puntuación) | K Permite ver el panel COLOR SELECTOR para seleccionar el color de la anotación o ROI |
| F Tipo y número de anotaciones | L Seleccione Shaded para rellenar la ROI con color o la opción Outline para aplicar color al contorno de la ROI |


Etiqueta ROI

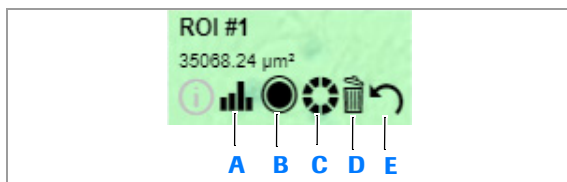

- A Icono Analizar ROI
- B Icono Sombreado
- C Icono Color
- D Icono Eliminar
- E Icono Deshacer


Paneles secundarios

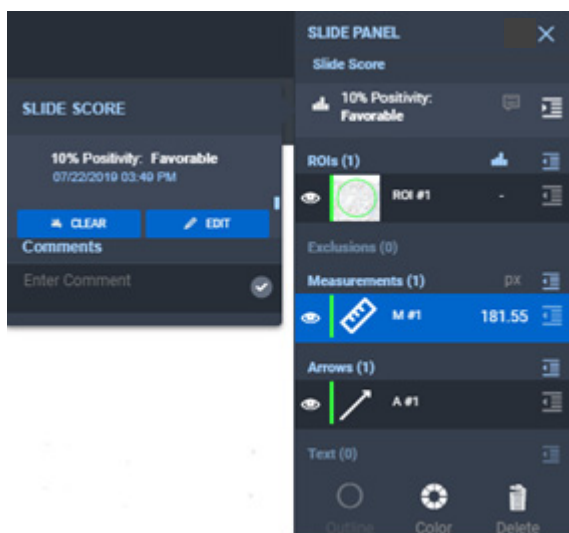

Se puede acceder a la ROI en la imagen del portaobjetos desde el icono  en **SLIDE PANEL**. Las funciones de la ROI aparecen en una ventana emergente en la imagen del portaobjetos.

Las áreas **Slide Score** y de anotación están asociadas con paneles secundarios, que contienen información o funciones adicionales.


El panel secundario **SLIDE SCORE** está disponible desde el área **Slide Score** cuando se ha analizado al menos un portaobjetos mediante el análisis asistido por ordenador.


- Con el icono , abra el panel **SLIDE SCORE** para consultar o editar la puntuación automática del análisis del portaobjetos.
- Seleccione botón **MANUAL SCORE** cuando elija un portaobjetos para introducir una puntuación manual.

Para cerrar el panel **SLIDE SCORE**, seleccione el icono que utilizó para abrirlo o haga clic fuera del panel.

Los paneles secundarios del área de anotación le permiten editar el nombre de la anotación, eliminarla o añadir un comentario. La tabla siguiente describe los paneles secundarios.

Panel secundario	Descripción
ROI	Disponible cuando se crea una ROI. Puede analizar una ROI desde este panel cuando esté disponible un análisis automatizado.
EXCLUSIONS	Disponible cuando se excluye un área de la ROI en la imagen del portaobjetos.
MEASUREMENTS	Disponible cuando se mide un área en la imagen del portaobjetos.
ARROWS	Disponible cuando se añade una flecha a la imagen del portaobjetos.
TEXT	Disponible cuando se añade un texto a la imagen del portaobjetos.

 Descripción de los paneles secundarios

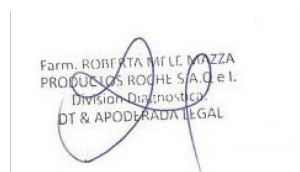


Temas relacionados

- Acerca del movimiento por las imágenes de los portaobjetos y los paneles (171)
- Visión general de la anotación en el SLIDE PANEL y de las herramientas de análisis (174)
- Apertura y cierre de los paneles del visor (78)
- Descripción general de la anotación y el análisis de imágenes (180)


Acerca de los paneles CASE LOG, PATIENT HISTORY, NOTES, THUMBNAIL y SLIDE INFO

Panel Case Log

Vea un registro de las acciones del caso.

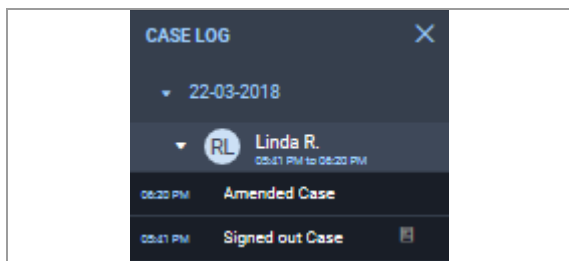

Panel Patient History

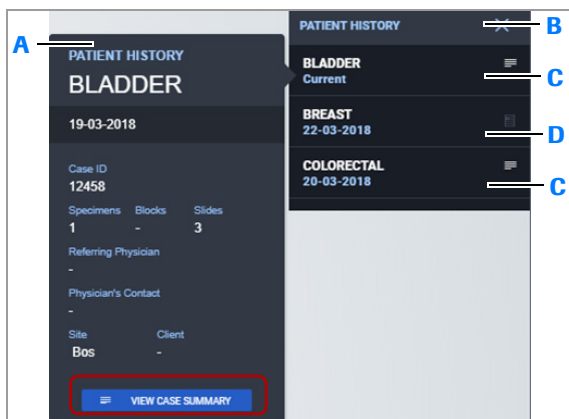


- A** Panel secundario para el caso abierto con el botón **VIEW CASE SUMMARY**.
- B** Panel **PATIENT HISTORY** del paciente con tres casos.
- C** Caso abierto (ícono de detalles en blanco intenso).
- D** Caso cerrado (ícono de detalles atenuado).

Visualice el tejido principal y la fecha de creación del caso para cada caso asociado con el paciente. Los casos abiertos se indican con un ícono de detalles en una fuente color blanco intenso. Los casos cerrados se indican con un ícono de informe atenuado.

- Utilice el ícono de detalles para mostrar el panel secundario y visualizar información adicional del caso. El panel secundario incluye al médico que trata y al médico remitente, el centro de tratamiento y el número de muestras y portaobjetos disponibles.
- Para los caso abiertos, utilice el botón **VIEW CASE SUMMARY** para ver, imprimir o descargar un informe de resumen en .pdf de dichos casos.

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A. C.e.l.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

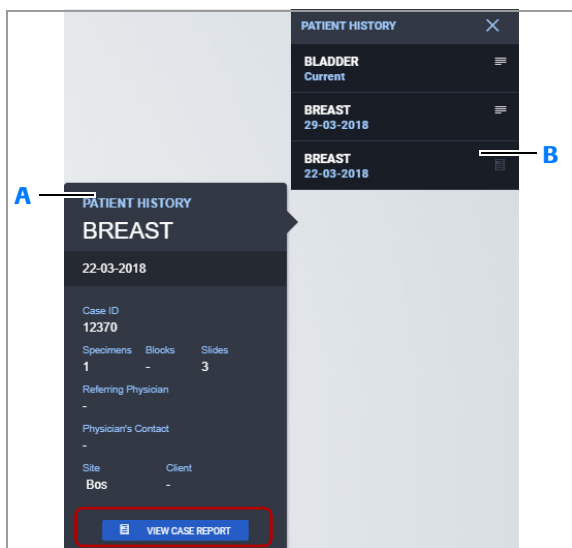


- Para los caso cerrados, utilice el botón **VIEW CASE REPORT** para ver, imprimir o descargar un informe en .pdf. Este panel también está disponible en la pantalla **CASES**.

A Panel secundario para el caso cerrado, con el botón **VIEW CASE REPORT**.

B Caso cerrado (ícono de informe atenuado).

Panel Notes

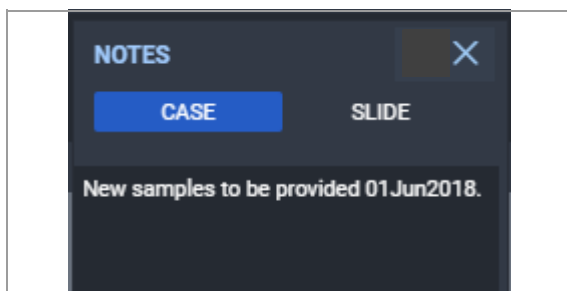

Incluye notas para un caso o para una imagen del portaobjetos.

Panel miniatura



Visualice la imagen en miniatura del portaobjetos junto con las anotaciones del portaobjetos escaneado.

Seleccione un portaobjetos y, a continuación, amplíe la imagen para ver el panel **THUMBNAIL**.

Cada portaobjetos contiene una etiqueta que indica la fase del análisis y su tipo de estado.

Panel Slide Info

SLIDE INFO	
Slide Label	S20-152-458-67 00-10-00-1
Slide annotation	
Case ID	S20-152-458-67
Specimen ID	00-1
Patient(Gender)	Jones, Sally , (Female)
Age(DOB)	70 years old, 01/01/1950
Marker	PD-L1 (SP263) NSCLC RUO
Tissue Type	Lung

Vea los metadatos asociados con el portaobjetos, como Slide Label, Scanner ID, Scanner Resolution y la calidad del Focus.

Seleccione un portaobjetos y, a continuación, amplíe la imagen para ver el panel **SLIDE INFO**. Utilice la barra de desplazamiento situada en la parte derecha del panel para ver toda la información disponible.


Puede mostrar el panel **SLIDE INFO** sin necesidad de mostrar la **THUMBNAIL** asociada.


Temas relacionados

- Acerca del movimiento por las imágenes de los portaobjetos y los paneles (171)
- Acerca de los paneles SLIDE NAVIGATOR y ALL SLIDES (172)
- Visión general de la anotación en el SLIDE PANEL y de las herramientas de análisis (174)
- Apertura y cierre de los paneles del visor (78)
- Utilización de herramientas de análisis (117)


Descripción general de la anotación y el análisis de imágenes

Puede definir una región de interés (ROI) en las imágenes del portaobjetos y añadir flechas, mediciones y anotaciones de texto. También puede introducir una puntuación manual. El software permite a los patólogos puntuar manualmente una imagen del portaobjetos.


 El análisis digital de biomarcadores basado en tejidos está disponible para las muestras procesadas con el sistema VENTANA (escáner de portaobjetos, anticuerpos, reactivos de detección y módulo de tinción). Si procede, se activa un botón de análisis en la ROI para generar un análisis automático.

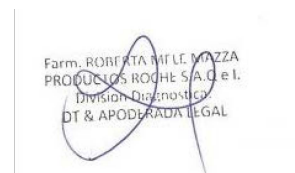


ROI, flechas, mediciones, y exclusiones

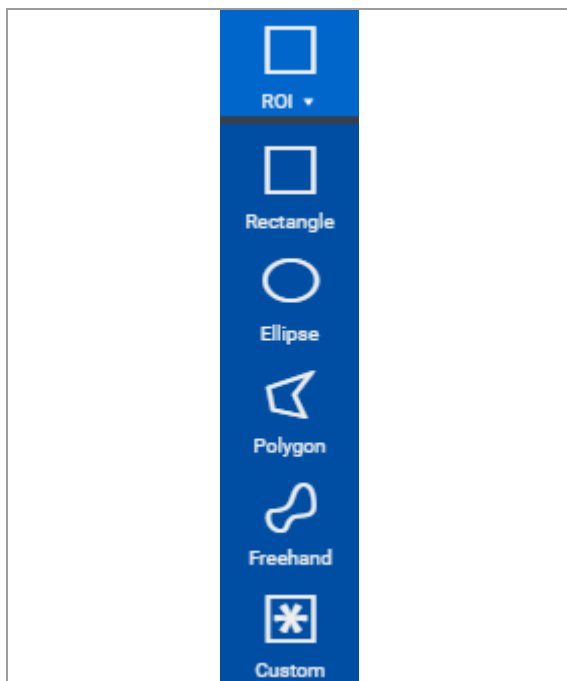

Las regiones de interés (ROI) de una imagen se pueden definir por formas como rectangular, elíptica y a mano alzada.

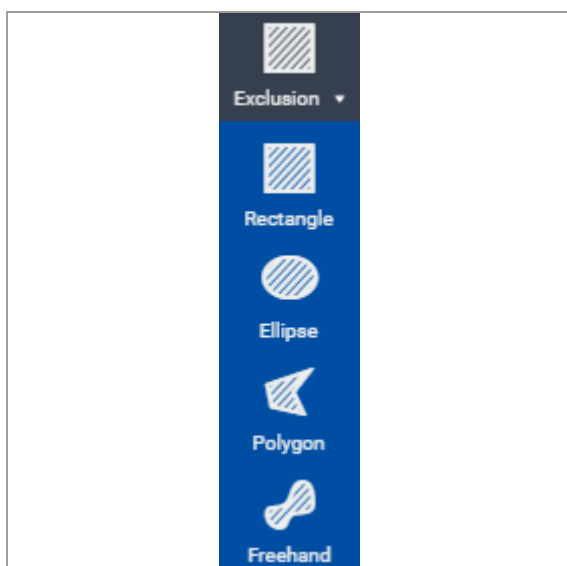


Se puede editar la ROI de tal manera que se excluyan áreas de análisis, y se puede eliminar ROI y el texto no deseado.

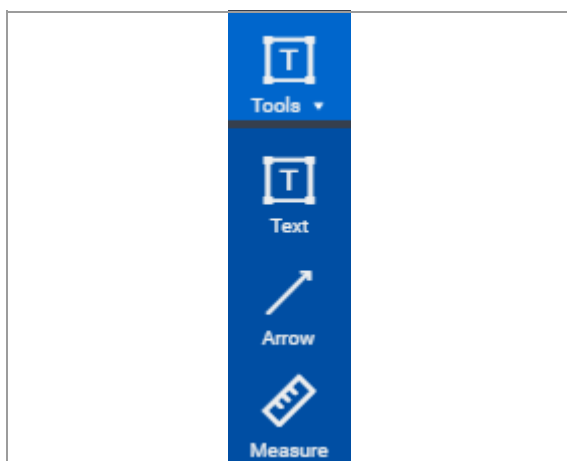

También están disponibles herramientas de anotación de medida y flecha. Con la herramienta Measure puede indicar la escala en píxeles (px), micrómetros (um) o milímetros (mm), en función de cómo configure los ajustes de medición en [User Preferences](#).

Análisis de la región de interés

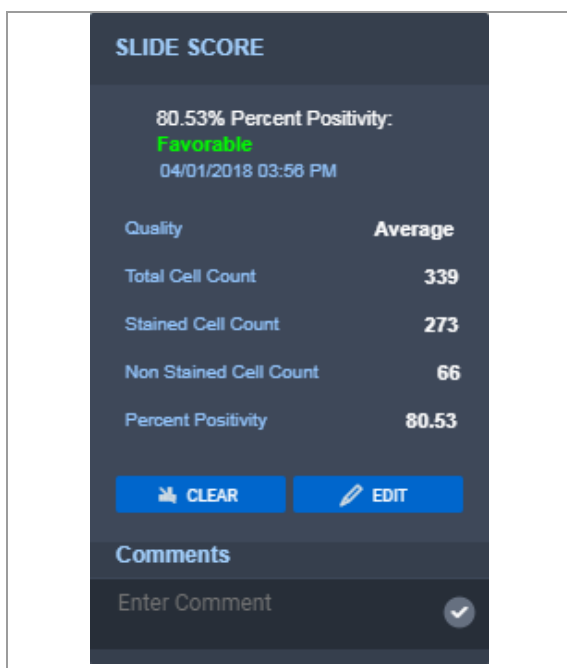

Cuando selecciona una región de interés (ROI), se muestra un panel secundario con la información para la ROI previa al análisis y después de que este se realice.

Un análisis automático de la ROI muestra la puntuación en el panel **SLIDE PANEL** con una indicación de pronóstico, como por ejemplo, favorable o no favorable para el tratamiento. Puede ver la puntuación para una ROI concreta, así como los detalles de la puntuación del portaobjetos.

Si crea y analiza diversas ROI en un único portaobjetos, se calculará un resultado conjunto como puntuación del portaobjetos y se incluirá en el informe.

Notificaciones sobre el estado de la licencia del algoritmo

Recibirá notificaciones (conocidas como indicaciones) cuando el algoritmo llegue al umbral mínimo configurado de usos restantes o lo supere. El administrador de uPath software determina el umbral.


También recibirá notificaciones cuando el uso de la licencia del algoritmo o la duración de uso de este haya finalizado o caducado. Una vez que la licencia caduca, el algoritmo deja de estar disponible para el análisis. El administrador puede ayudarle a renovar la licencia o puede decidir cómo se reciben las notificaciones del caso.

Descripción general de la pantalla REPORT

Contenidos de esta sección

Acerca de la generación y el cierre de un informe (183)

Acerca de la conservación de las imágenes (183)

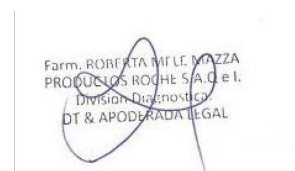


Acerca de la generación y el cierre de un informe


Una vez se han revisado las imágenes del portaobjetos y los documentos, y se ha completado el proceso, se genera un informe.

En la pantalla **REPORT** se muestran las plantillas del informe disponibles para el centro y el tipo de tejido.

Puede modificar el informe añadiendo o editando las notas, comentarios o comentarios predefinidos.

Cuando se complete el informe, podrá visualizarlo y cerrarlo. Posteriormente, el caso se moverá a la carpeta **All Signed Out Cases**.

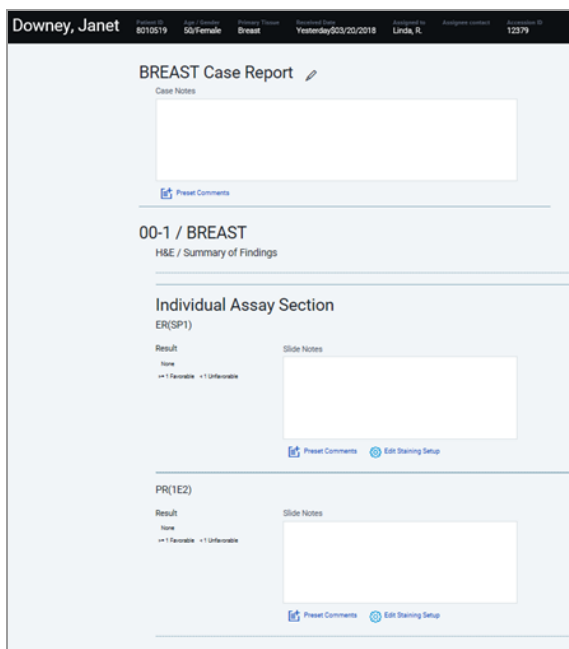


 El administrador del centro puede crear nuevas plantillas de informes. Contacte con el administrador del centro si desea crear una nueva plantilla de informe.

Acerca de la conservación de las imágenes

Es posible anular las reglas de eliminación de imágenes y archivado que el administrador ha establecido. Póngase en contacto con el administrador para obtener información específica sobre los ajustes de las reglas de uPath software.

En la pantalla REPORT, el botón **Keep Images** permite conservar las imágenes del caso que ha seleccionado, anulando las reglas de eliminación de imágenes y archivado que se han establecido en uPath software.

En la pantalla REPORT, el botón **Not Keep Images** permite revertir la selección sobre la conservación de imágenes del caso que haya elegido, eliminando la anulación de las reglas de eliminación de imágenes y archivado que se han establecido en uPath software.

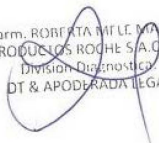

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Coordinación de casos

4	Realización de la coordinación de casos	187
---	---	-----

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. e.l.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Realización de la coordinación de casos

Contenidos del capítulo

4

Descripción general de las pantallas CASES y VIEWER	189
Acerca de las funciones y la distribución de la pantalla CASES	189
Acerca del menú CASES	190
Acerca de las funciones y la distribución de la pantalla VIEWER	190
Seguimiento del avance del caso	193
Visualización de la lista ALL ACTIVE CASES	194
Identificación de casos que requieren un patólogo ..	195
Identificación de un caso que requiera portaobjetos	196
Examinación de los parámetros de asignación de casos	197
Asignación o reasignación de un caso a un patólogo	198
Asignación del estado URGENT a un caso	200



Farm. ROBERTA MFLR. MOZZA
PRODUCTOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Descripción general de las pantallas CASES y VIEWER

Contenidos de esta sección


Acerca de las funciones y la distribución de la pantalla CASES (189)

Acerca del menú CASES (190)

Acerca de las funciones y la distribución de la pantalla VIEWER (190)


Acerca de las funciones y la distribución de la pantalla CASES

La pantalla CASES se utiliza para ver los casos activos.

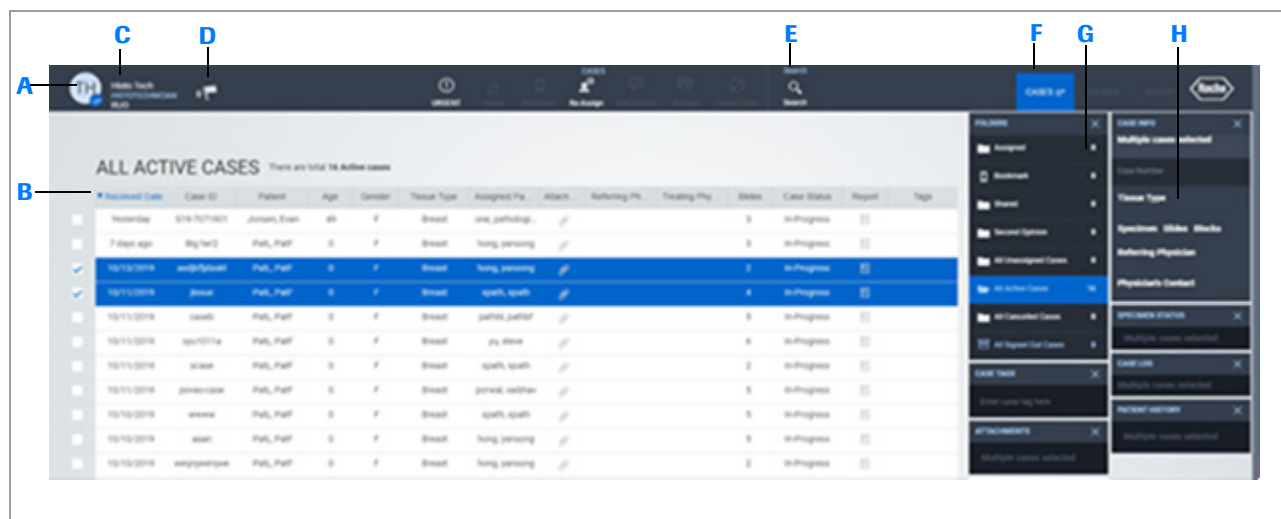

- A** Barra de menú Quick Action con el botón **User Settings**, notificaciones, búsqueda y apertura o cierre de los paneles con la información del caso.
- B** Área principal de visualización con los casos activos e información.
- C** Botón **User Settings** que abre un menú con opciones para **uPath**, **Help & Support**, About software version y **Logout**.
- D** Vista de notificaciones de casos nuevos o acciones requeridas para los casos ya existentes.
- E** Busque o muestre un caso concreto.
- F** Muestre u oculte el menú **CASES**.
- G** Abra las carpetas para ver listas de casos adicionales.
- H** Abra o cierre los paneles para ver información adicional sobre el paciente y la muestra o archivos adjuntos.

Acerca del menú CASES

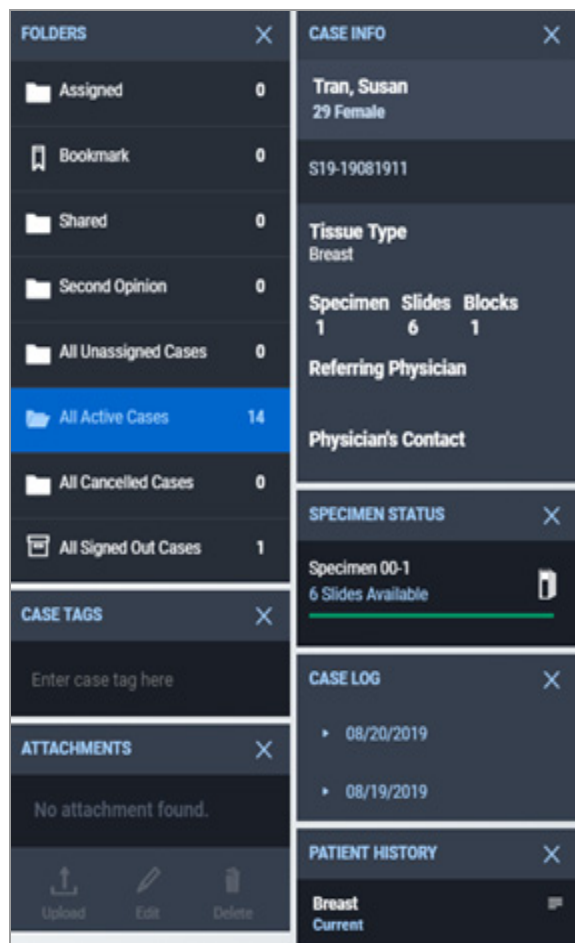

Abra o cierre los paneles desde la pestaña **CASES**.

Al abrir la pantalla **CASES**, se muestran todos los paneles disponibles. Si selecciona mostrar un subconjunto de paneles, dicha selección estará vigente hasta que la cambie.


Utilice el panel **ATTACHMENTS** para acceder a documentos externos relacionados con el caso y a imágenes cargadas por el patólogo o el histotécnico.

Temas relacionados

- Filtrado y búsqueda de información (37)
- Apertura y visualización de los paneles en la lista CASES (50)

Acerca de las funciones y la distribución de la pantalla VIEWER

Funciones de la pantalla VIEWER

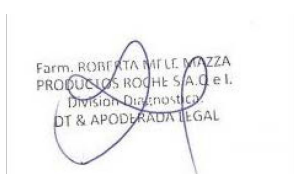


El patólogo utiliza la mayor parte de las funciones de la pantalla **VIEWER** para ver y analizar los portaobjetos.

El menú **User Settings** y el indicador de notificaciones están disponibles en la pantalla **VIEWER**. El menú **User Settings** contiene una opción para ocultar la identidad del paciente.

Las pestañas **CASES** y **VIEWER** están disponibles en la barra de menú Quick Action. La pestaña **VIEWER** está asociada a la selección de opciones del panel.


Los paneles **CASE LOG** y **PATIENT HISTORY** se pueden mostrar en la pantalla **VIEWER**.


 El histotécnico no tiene acceso a la pantalla **REPORT**, que es la que utiliza el patólogo para cerrar los casos.

Funciones y distribución de la pantalla VIEWER


Para ver los portaobjetos, utilice los botones de la barra de menú Quick Action y los paneles de la pantalla **VIEWER**. Hay algunas opciones redundantes entre los botones y los paneles para realizar tareas rutinarias como desplazamientos panorámicos sobre una imagen.


A continuación, se presenta un resumen de las áreas funcionales de la pantalla **VIEWER**.

 Los botones de la barra de menú Quick Action están disponibles cuando sus acciones correspondientes son adecuadas para la fase actual del proceso de análisis del portaobjetos. Los botones disponibles se muestran en una fuente de color blanco intenso. Al elegir un botón disponible, se vuelve azul intenso.

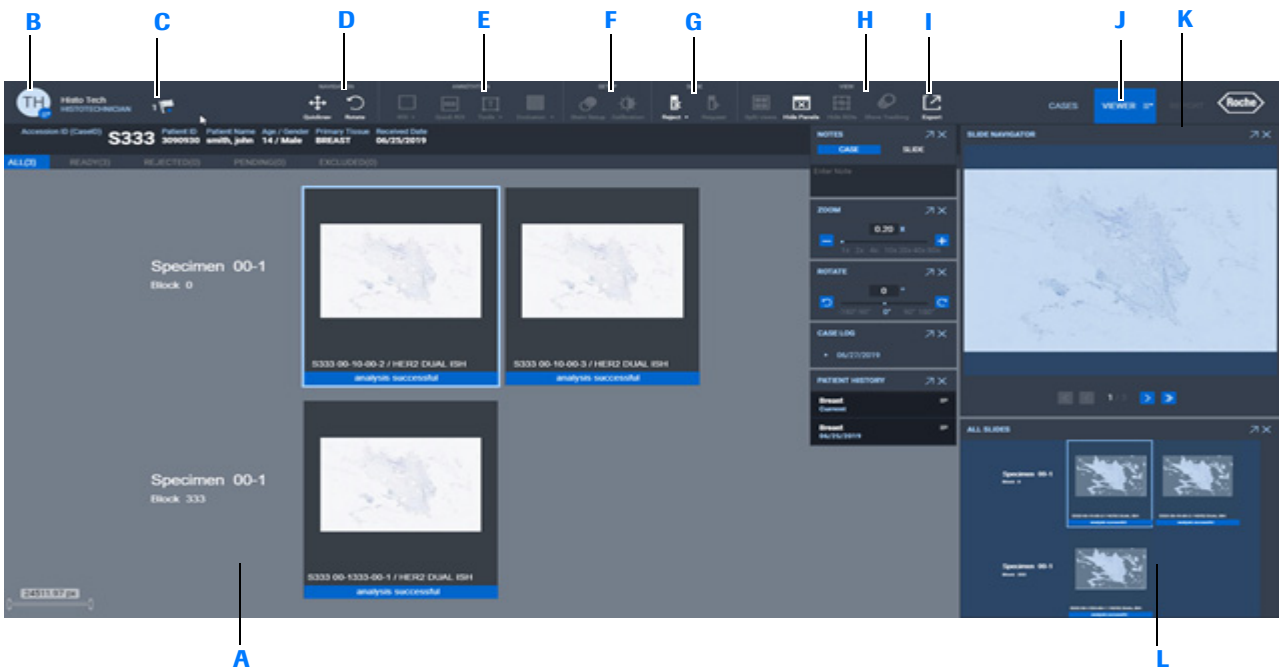

- | | | |
|---|---|--|
| A Área principal de visualización | E Botones del área ANNOTATION | I Botón Export |
| B Menú de configuración de usuario | F Botones del área de SETUP (Stain setup) | J Lista desplegable de la pestaña VIEWER |
| C Indicador de notificaciones | G Botones del área SLIDE | K Panel SLIDE NAVIGATION |
| D Botones del área NAVIGATION | H Botones del área VIEW | L Panel ALL SLIDES |

 Pantalla VIEWER. No se muestran la selección de portaobjetos, la barra de información ni la barra de identificación del paciente.

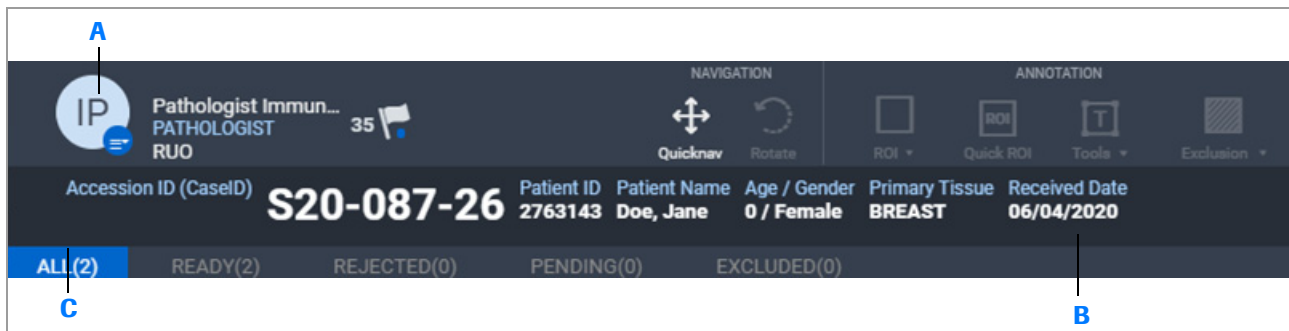


A Barra de menú Quick Action

B Barra de identificación de paciente

C Selección de portaobjetos y barra de información

Temas relacionados

- Navegación por las pantallas del software y configuración del usuario (29)
- Repetición del escaneado de un portaobjetos (89)
- Visualización de un nivel de enfoque para los portaobjetos escaneados (120)
- Seguimiento de la visualización del portaobjetos (121)
- Registro de portaobjetos (124)
- Visualización de portaobjetos en tándem (125)
- Visualización de portaobjetos por separado (127)

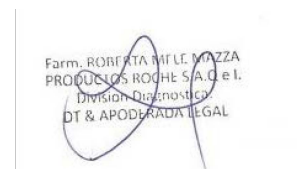

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Seguimiento del avance del caso

Utilice la pantalla **CASES** para hacer un seguimiento del avance de los casos.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software.
- Antes de llevar a cabo esta tarea debe tener asignada la función de coordinador y los permisos correctos.

► Para abrir las listas de casos


1 Seleccione **User Settings > uPath > CASES > FOLDERS**.

2 Seleccione la lista de casos que quiere mostrar a partir de las siguientes carpetas:

- **All Active Cases**
- **All Canceled Cases**
- **All Signed Out Cases**

» **Temas relacionados**

- Filtrado y búsqueda de información (37)
- Apertura y visualización de los paneles en la lista CASES (50)

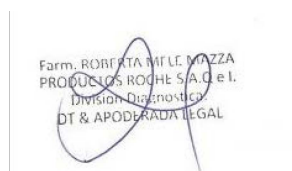

Visualización de la lista ALL ACTIVE CASES

Puede ver los casos activos, cancelados o cerrados.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de histotécnico.

► Para abrir las listas de casos


- 1 Seleccione las opciones **User Settings > uPath**.
→ Se mostrará la pantalla **CASES** con la lista **ALL ACTIVE CASES**.
- 2 Para ver otra lista de casos o abrir o cerrar los paneles, seleccione **CASES > FOLDERS** y elija la carpeta **All Canceled Cases** o **All Signed Out Cases**.
- 3 Para ver las entradas truncadas en la lista de casos, sitúe el cursor del ratón sobre una entrada.

► Temas relacionados

- Navegación por uPath software (29)

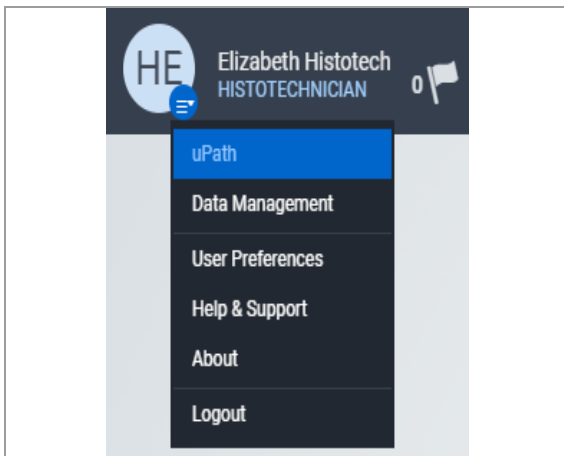


Case ID	Patient	Age
2376	Nagle, John	
2376	Nagle, Jo...	77

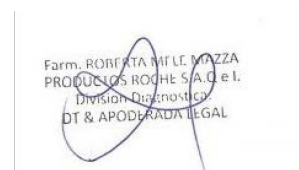

Identificación de casos que requieren un patólogo


Un caso puede requerir que se asignen portaobjetos o un patólogo antes de que avance en el flujo de trabajo.

Cuando hay un nuevo caso disponible para reasignar, puede recibir una notificación, correos electrónicos o una notificación en un banner verde en función de cómo haya configurado sus [User Preferences](#).

 Consulte con el administrador o el histotécnico los casos en los que no hay un patólogo asignado.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignado el permiso correcto.
- La pantalla **CASES** está abierta.
-  Apertura de paneles de casos (54)

► Para identificar casos que requieren un patólogo

- 1 Seleccione **FOLDERS > All Active Cases**.
- 2 En la columna **Assigned Pathologist**, desplácese hasta la parte de abajo de la columna para ver los casos que no tienen un patólogo asignado.

ALL ACTIVE CASES		There are total 6 Active cases					Assigned Pathologist
Received Date	Case ID	Patient	Age	Gender	Tissue Type		
Today	12588	Chet, John	35	M	Breast		

Temas relacionados

- Visualización de notificaciones (32)
- Asignación o reasignación de un caso a un patólogo (198)

Identificación de un caso que requiera portaobjetos

Los casos sin portaobjetos no pueden avanzar en el flujo de trabajo. Antes de que el patólogo lleve a cabo el análisis, los portaobjetos deben estar asociados con un caso.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignado el permiso correcto.

► Para identificar un caso que requiera portaobjetos

- 1 Seleccione **FOLDERS > All Active Cases**.
- 2 Seleccione el encabezado de la columna **Slides** para ordenar la columna de tal manera que los casos con 0 portaobjetos aparezcan al principio de la lista.
- 3 En la columna **Received** correspondiente, fíjese en la fecha en la que se creó cada caso con 0 portaobjetos.
 - ❶ Informe al técnico o al administrador, según corresponda, acerca de los casos sin portaobjetos.

Treating Physician	▲ Slides	Case Status	Report
	0	Pending	

Farm. ROBERTA MILE MOZZA
 PRODUCOS ROCHE S.A. de I.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Examinación de los parámetros de asignación de casos

Con la lista **ALL ACTIVE CASES**, consulte el total de casos activos en uPath software y el número de casos activos y URGENT asignados a cada patólogo.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignado el permiso correcto.

► Para examinar los parámetros de asignación de casos

1 Seleccione **FOLDERS > All Active Cases**.

2 Al lado del nombre de la tabla, fíjese en el número total de casos activos.

ALL ACTIVE CASES					
There are total 11 Active cases					
Received Date	Case ID	Patient	Age	Gender	
5 days ago	12356	Johnson, ...	54	F	

3 Seleccione la columna **Assigned** para ordenar la columna y ver el número total de casos asignados a cada patólogo.

ALL ACTIVE CASES					
There are total 11 Active cases					
Received Date	Case ID	Patient	Age	Gender	Tissue Type
03/30/20...	12340	Barns, Hill...	60	F	Breast
03/30/20...	12348	Larkin, He...	43	F	Breast

- En la columna **Received**, fíjese en la fecha en la que se asignó cada caso a un patólogo.

4 (Opcional) Para ver una lista de los patólogos asignados a su centro, siga estos pasos:

- Seleccione un caso que no tenga un patólogo asignado y, a continuación, haga clic en el botón **Re-Assign** para abrir el cuadro de diálogo **Reassign Case**.
- Seleccione el campo de búsqueda **Reassign to...** para ver la lista de patólogos.

5 Revise la lista de casos urgentes.

- ① Los casos urgentes se muestran en las tablas **ALL ACTIVE CASES** con una fuente de color rojo.

6 Si el cuadro de diálogo **Reassign Case** está abierto, seleccione el botón **CANCEL**.

Asignación o reasignación de un caso a un patólogo

Asigne un caso a un patólogo para mover el caso a la cola del patólogo. Puede revisar el número de casos activos y URGENT asignados a cada patólogo antes de reasignar un caso.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignado el permiso correcto.

► Para reasignar o asignar un caso a un patólogo

- 1 Seleccione **FOLDERS > All Active Cases** y, a continuación, escoja el caso que desea reasignar.
- 2 Seleccione el botón **Re-Assign**.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **Reassign Case**.
- 3 Seleccione el campo de búsqueda **Reassign to...** para ver una lista de patólogos. Seleccione el patólogo al que desea reasignar el caso.
 - Si se muestra un patólogo incorrecto, seleccione el botón **X** para eliminarlo. Seleccione el campo de búsqueda **Reassign to...** para escoger a un patólogo distinto.
 - El nombre del patólogo se muestra en el campo **Will reassign to 1 person**.
- 4 Introduzca una nota opcional en el campo **Notes**.
- 5 Seleccione el botón **DONE** para completar la reasignación o el botón **CANCEL** para descartar los cambios.
 - El caso se ha asignado a un patólogo o se ha reasignado a un patólogo nuevo. La información del caso de la Data Management se actualiza con una nueva asignación a un patólogo.
 - El panel **CASE LOG** se actualiza con todas las entradas anteriores del caso y con una entrada nueva con la información de reasignación que incluye la fecha, la marca de tiempo y la identificación del patólogo al que se ha reasignado el caso.

Reassign to ...			
Search			
CJ	Chen, Joyce	Bos	Add
NN	Natho, Nancy	hematology	Bos Add
MS	Matho, Susan	Bos	Add

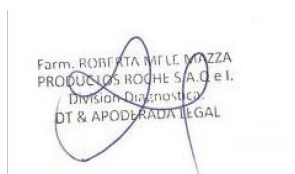

Temas relacionados

- Identificación de un caso que requiera portaobjetos (196)
- Examinación de los parámetros de asignación de casos (197)

Asignación del estado URGENT a un caso

Es posible cambiar la prioridad de un caso de ASSIGNED a URGENT mediante los botones de la barra de menú Quick Action de la pantalla CASES. Los casos URGENT se pasan a una lista independiente para facilitar su localización y se presentan con una fuente de color rojo. Puede cancelar un caso o reabrir un caso cerrado.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **CASES** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de patólogo y los permisos correctos.

► Para asignar a un caso el estado URGENT o eliminarlo

- 1 Seleccione **FOLDERS > Assigned**.
- 2 En la lista de casos **ASSIGNED**, seleccione el o los casos a los que desea cambiar el estado de asignado a urgente.
- 3 En la barra de menú Quick Action, seleccione el botón **URGENT**.
 - El caso pasa de la lista ASSIGNED a URGENT y la información del caso dentro de la lista se muestra en una fuente de color rojo.
- 4 Para volver al estado ASSIGNED, seleccione el caso y, a continuación, haga clic en el botón **Not Urgent**.
 - El caso vuelve a la lista de ASSIGNED.

📖 Temas relacionados

- Asignación del estado URGENT a un caso (200)

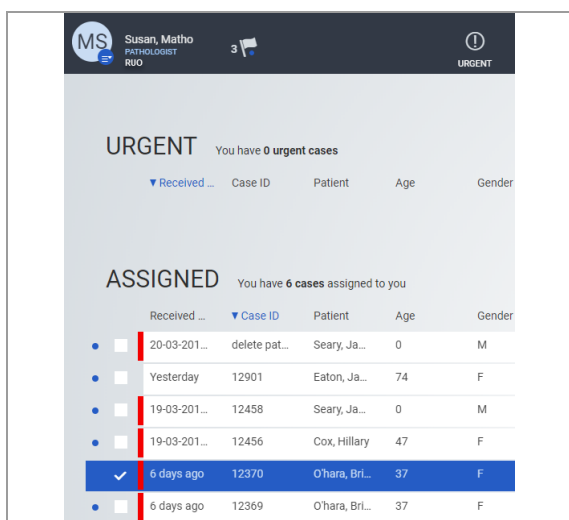

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Ajustes de administrador

5	Configuración general.....	203
---	----------------------------	-----

Farm. ROBERTA MFLI. MOZZA
PRODUCES ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Configuración general

Contenidos del capítulo

5


Configuración del monitor	207
Configuración general del software	208
Gestión de imágenes de portaobjetos	208
Configuración del formato de ID de portaobjetos	208
Configuración de eliminación de imágenes del portaobjetos y archivado	209
Configuración de la función de compartir casos .	210
Configuración del Software VENTANA Connect .	211
Definición de los ajustes de organización	211
Introducción de la información de organización	211
Configuración de los ajustes de fecha y hora	212
Configuración de las notificaciones por correo electrónico	213
Configuración del panel del visor	214
Configuración de informe	215
Acerca de la configuración de informe	215
Gestión de los tipos de tejido para plantillas de informes	217
Adición de un tipo de tejido a una plantilla . .	217
Eliminación de un tipo de tejido de una plantilla	218
Creación y modificación de plantillas de informe	218
Creación de una nueva plantilla de informe . .	219
Duplicación de una plantilla de informe existente	220
Modificación del encabezado del informe . . .	221
Configuración de la información del caso y adición de las notas del caso	222
Configuración de las secciones Summary of Findings e Individual Assay	224
Configuración de la sección Gross Image and Description	226
Modificación de la sección Footer	227
Configuración de la sección Signature	228
Gestión de plantillas del informe	229
Edición de una plantilla del informe predeterminada	229
Cambio del nombre de una plantilla del informe	230
Eliminación de una plantilla del informe	231

Desactivación de una plantilla del informe...	231
Activación de una plantilla del informe.....	232
Configuración del catálogo de algoritmos	234
Acerca de la configuración de algoritmos	234
Configuración de los algoritmos.....	234
Adición de un nuevo algoritmo.....	234
Eliminación de un algoritmo	235
Cambio del estado de activación de un algoritmo	236
Gestión de algoritmos	238
Acerca de agrupaciones de pronósticos y parámetros de salida	238
Acerca de agrupaciones de pronósticos.....	239
Configuración de agrupaciones de pronósticos .	239
Adición de una agrupación de pronósticos para puntuación manual	239
Edición de una agrupación de pronósticos de puntuación manual	241
Eliminación de una agrupación de pronósticos de puntuación manual	242
Edición de parámetros de salida para los tipos de algoritmos de puntuación.....	243
Seguimiento del software e informes de auditoría ..	245
Acerca de la configuración del seguimiento y la generación de informes.....	246
Configuración del seguimiento del software	247
Activación y desactivación del seguimiento del software.....	247
Selección de las operaciones de software de uPath software de las que se realiza un seguimiento.....	247
Gestión de los informes de uso	248
Acerca del informe de uso	249
Generación de un informe de uso	250
Gestión del informe de auditoría	250
Acerca del informe de auditoría.....	251
Generación de un informe de auditoría.....	252
Gestión de la cola de tareas de la imagen	254
Acerca de la cola de tareas.....	254
Gestión de la cola de tareas	254
Revisión y clasificación de las tareas en curso	255
Cancelación de las tareas en curso.....	255
Revisión de tareas pendientes	256
Cancelación de tareas pendientes.....	256
Revisión de tareas fallidas.....	257
Revisión y clasificación de las tareas fallidas.	257
Cancelación de tareas fallidas	258
Reiniciación de tareas fallidas	258
Revisión y clasificación de las tareas canceladas/completadas.....	259
Reiniciación de tareas canceladas	259

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUC. LOS ROCHE S.A. Q.e.I.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL


Configuración de la tinción.	260
Acerca de la configuración de la tinción.	260
Configuración de la configuración de tinción	261
Adición de resultados y declaraciones de descargo de responsabilidad de control de biomarcadores.	261
Edición de los resultados y las declaraciones de descargo de responsabilidad de control de los biomarcadores.	262
Configuración de las reglas de administración	263
Acerca de la configuración de las reglas de análisis de la imagen	264
Lista de tipos de tejido predeterminados, de biomarcador y de clon	264
Gestión de tipos de tejido	265
Incorporación y eliminación de un tipo de tejido.	266
Cambio del nombre de un tipo de tejido.	266
Modificación de un tipo de tejido	267
Configuración del tipo de tejido predeterminado	268
Conversión de un tipo de tejido en elemento predeterminado	269
Cambio del estado de activación de un tipo de tejido.	270
Eliminación de un tipo de tejido.	271
Asociación de un tipo de tejido a una prueba de biomarcador.	272
Creación y modificación de tipos de pruebas globales	274
Adición de un tipo de prueba global	274
Edición de un tipo de prueba global	274
Cambio del estado de activación de un tipo de prueba global.	275
Eliminación de un tipo de prueba global.	276
Creación y modificación de tipos de clones globales	277
Adición de un tipo de clon global	277
Edición de un tipo de clon global.	277
Cambio del estado de activación de un tipo de clon global	278
Eliminación de un tipo de clon global.	279
Gestión de proveedores globales	280
Adición de un proveedor global	280
Edición de un proveedor global	280
Cambio del estado de activación de un proveedor global.	281
Eliminación de un proveedor global.	282
Habilitación o deshabilitación del filtro entrante	283
Configuración de comentarios predefinidos.	284
Acerca de la configuración de comentarios predefinidos	284
Configuración de comentarios predefinidos.	285

Incorporación de comentarios predefinidos.. 285
Edición de comentarios predefinidos 285
Importación de comentarios predefinidos ... 286
Cambio del estado de activación de un
comentario predefinido 287
Eliminación de comentarios predefinidos.... 287
Mostrar información de la licencia 288

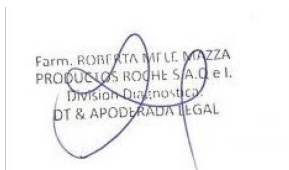


Configuración del monitor

Configure las siguientes especificaciones mínimas recomendadas del monitor del ordenador para poder visualizar las imágenes del portaobjetos.

 Recorra al software comercial de calibración de color que se encuentra disponible para calibrar el monitor cada seis meses.

Descripción	Especificaciones mínimas
Tamaño del monitor y de píxel y resolución	Monitor de 20 pulgadas con 1920x1080 píxeles
Velocidad de actualización del monitor	Mínimo: 60 Hz

 Especificaciones mínimas recomendadas del monitor para trabajar con uPath enterprise software

Farm. ROBERTA NITILE MAZZA
 PRODUC. LOS ROCHE S.A.S. e I.
 Divisione Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Configuración general del software

Contenidos de esta sección

- Gestión de imágenes de portaobjetos (208)
- Configuración de la función de compartir casos (210)
- Configuración del Software VENTANA Connect (211)
- Definición de los ajustes de organización (211)

Gestión de imágenes de portaobjetos

Contenidos de esta sección

- Configuración del formato de ID de portaobjetos (208)
- Configuración de eliminación de imágenes del portaobjetos y archivado (209)

Configuración del formato de ID de portaobjetos

Puede especificar si los ID de los portaobjetos son asignados por o recibidos de una fuente externa, como un Sistema de información de laboratorio (LIS).

Los ID de los portaobjetos utilizan caracteres especiales para separar los datos del caso, el bloque y la muestra en la etiqueta del portaobjetos. Puede seleccionar el tipo de separador que quiera utilizar con los ID de los portaobjetos que se generan en uPath software.

En este ejemplo, CS110AB 1:A2, se utiliza un espacio y dos puntos en el ID del portaobjetos para separar el ID del caso de la muestra y la muestra y el bloque.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de administrador y los permisos correctos.

► Para cambiar la configuración de ID del portaobjetos

- 1 Seleccione **Administrator Settings > General Configuration > uPath Slide ID Format > Use LIS Slide ID**.
- 2 El ajuste predeterminado de **Use LIS Slide ID** es No.
- 3 Para definir los separadores que se utilizan en los ID del portaobjetos que genera uPath software, seleccione No y, a continuación, seleccione los separadores que desea introducir entre **Case ID-Specimen**, **Specimen-Block** y **Block-Slide**. Seleccione el botón **SAVE** cuando haya terminado.

uPath Slide ID Format

Use LIS Slide ID
 Yes No

CaseID - Specimen Sequence separator
 :

Specimen Sequence - Block Sequence separator
 -

Block Sequence - Slide Sequence separator
 None

Example Slide ID
 CS110AB:1-A2

Configuración de eliminación de imágenes del portaobjetos y archivado


Puede definir cómo gestionar las imágenes del portaobjetos para su propia organización y para compartir el caso; también puede definir cómo archivar las imágenes y gestionar los ajustes de carga del tamaño del archivo.

💡 De acuerdo con las prácticas recomendadas, debe hacer una copia de seguridad de las imágenes de forma local.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de administrador y los permisos correctos.

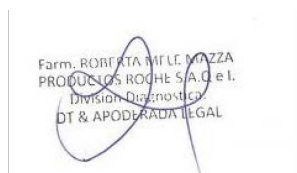

Images in Cases in Signed Out Folder

Deletion Duration

Off On 7 Days

► Para cambiar los ajustes Image Deletion and Archival

- 1 Seleccione **Administrator Settings > General Configuration > Image Deletion and Archival**.
- 2 Para las imágenes en la carpeta de archivado, haga lo siguiente:
 - **Images in Cases in Signed Out Folder:** Seleccione el botón **Off** o el botón **On** para establecer la duración de la eliminación automática de imágenes y el número de días antes de que se eliminen las imágenes.

3 Para las imágenes en la carpeta de asignado, haga lo siguiente:

- **Images in Cases in Assigned Folder:** Seleccione el botón **Off** o **On** para establecer la eliminación automática de imágenes y el número de días antes de que se eliminen las imágenes.
- **Archive to:** Seleccione el botón **Off** o el botón **On** para establecer el archivado automático y el número de días que deben transcurrir hasta que se archive una imagen.

4 Para **Images not associated with a case**, seleccione el botón **Off** o el botón **On** para establecer sus preferencias para eliminar las imágenes no asociadas con un caso.

5 Para **Control Slide Images**, seleccione el botón **Off** u **On** para establecer sus preferencias de eliminación automática para todas las imágenes del portaobjetos de control.

6 Seleccione el botón **SAVE**.

Configuración de la función de compartir casos

Puede configurar uPath software de forma que se compartan automáticamente los casos entre todos los usuarios de un centro o cliente. Cuando establezca los permisos, es para todos los usuarios de ese centro o cliente.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para configurar la función de compartir casos en centros o clientes

1 Seleccione **Administrator Settings > General Configuration > Sharing Cases**.

2 Para cambiar la configuración del permiso para un centro o cliente concreto, seleccione el botón .

3 En la lista desplegable **Permissions**, seleccione **None**, **View Only**, **View and Modify** o bien **View, Modify and Analyze**.

User	Permissions
Site: SC	View, Modify and Analyze
Client: Auto2046911	None
Client: Auto20469302	None
Client: Automator04085344	View, Modify and Analyze
Client: Green_Lab	View, Modify and Analyze
Client: test	None

- 4 Seleccione **DONE** para ver la selección en la columna **Permissions**.
- 5 Seleccione el botón **SAVE**.

Configuración del Software VENTANA Connect

El software VENTANA Connect permite el enlace entre uPath software y el Sistema de información de laboratorio (LIS) a través de una sola conexión, segura y normalizada.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para configurar VENTANA Connect


- 1 Seleccione **Administrator Settings > General Configuration > VENTANA Connect**.
- 2 Especifique la URL adecuada de uPath enterprise software.
- 3 Seleccione el botón **SAVE**.

Definición de los ajustes de organización

Contenidos de esta sección

- Introducción de la información de organización (211)
- Configuración de los ajustes de fecha y hora (212)
- Configuración de las notificaciones por correo electrónico (213)

Introducción de la información de organización

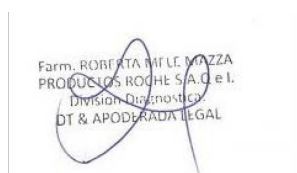

Puede introducir el nombre de su organización, la designación como un hospital o laboratorio y la información de contacto. La información se mostrará en encabezados de informes.

- Los campos del ID y del nombre son de solo lectura y no se pueden editar.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para introducir la información de organización

- 1 Seleccione **General Configuration > Organization Information**.
- 2 Rellene los campos que desea que se muestren en el encabezado de informes: dirección, teléfono de contacto y tipo de instalación.
- 3 Seleccione el botón **SAVE**.

Configuración de los ajustes de fecha y hora

Puede establecer el formato de fecha y hora para su instalación.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cambiar el formato de fecha y hora

- 1 Seleccione **General Configuration > Date and Time**.
- 2 En la lista desplegable **Date**, seleccione el formato de fecha (como MM/DD/AAAA, DD-MM-AAAA, etc.).
- 3 En la lista desplegable **Time**, seleccione el formato de hora (hh:mm (am/pm o HH:mm)).
- 4 Seleccione el botón **SAVE**.

Farm. ROBERTA INFLE. MOZZA
 PRODUTOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

Configuración de las notificaciones por correo electrónico

Puede configurar los ajustes del servidor del correo electrónico y del servidor proxy de forma que uPath software envíe las notificaciones a un patólogo o histotécnico mediante correo electrónico, en lugar de únicamente notificaciones en pantalla.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para configurar el correo electrónico

- 1** Seleccione **General Configuration > Email Configuration**.
- 2** Si desea activar las notificaciones por correo electrónico, marque la casilla de verificación correspondiente.
- 3** Seleccione el botón **SAVE**.

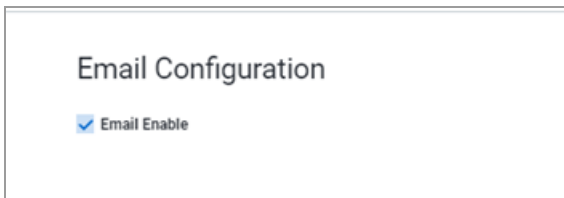

Configuración del panel del visor

Es posible que los administradores necesiten abrir paneles en el **VIEWER** de todos los usuarios.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para configurar los paneles del visor

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Viewer Configuration**.
- 2 Para bloquear la configuración del panel del visor, seleccione el valor On de la opción **Lock Configuration**.
- 3 Para establecer los paneles que se abren en **VIEWER**, marque la casilla de verificación que se encuentra junto al nombre del panel.
- 4 Seleccione el botón **SAVE**.

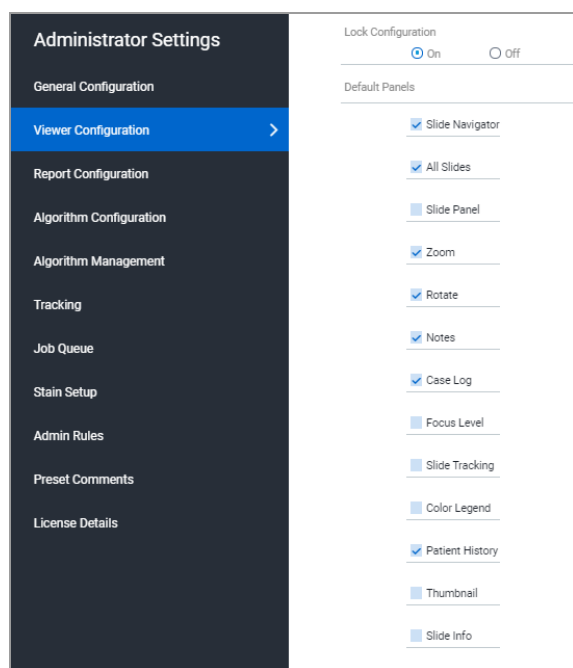

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A.Q.e.l.
 DIVISION Diagnostico
 DT & APODERADA LEGAL

Configuración de informe

Contenidos de esta sección


- Acerca de la configuración de informe (215)
- Gestión de los tipos de tejido para plantillas de informes (217)
- Creación y modificación de plantillas de informe (218)
- Gestión de plantillas del informe (229)

Acerca de la configuración de informe


Puede utilizar la plantilla de informe predeterminada o crear una plantilla de informe personalizada para cada centro o cliente. Una plantilla de informe personalizada para un patólogo puede incluir el logotipo de una instalación, la dirección de una instalación, los encabezados de una sección, un descargo de responsabilidad y la información del caso.

Las plantillas se activan para el patólogo durante el informe y el cierre de un caso en función del tipo de tejido asociado con el caso.

Para crear una nueva plantilla para un nuevo tipo de tejido, cree y configure, en primer lugar, ese tipo de tejido en Admin Rules.

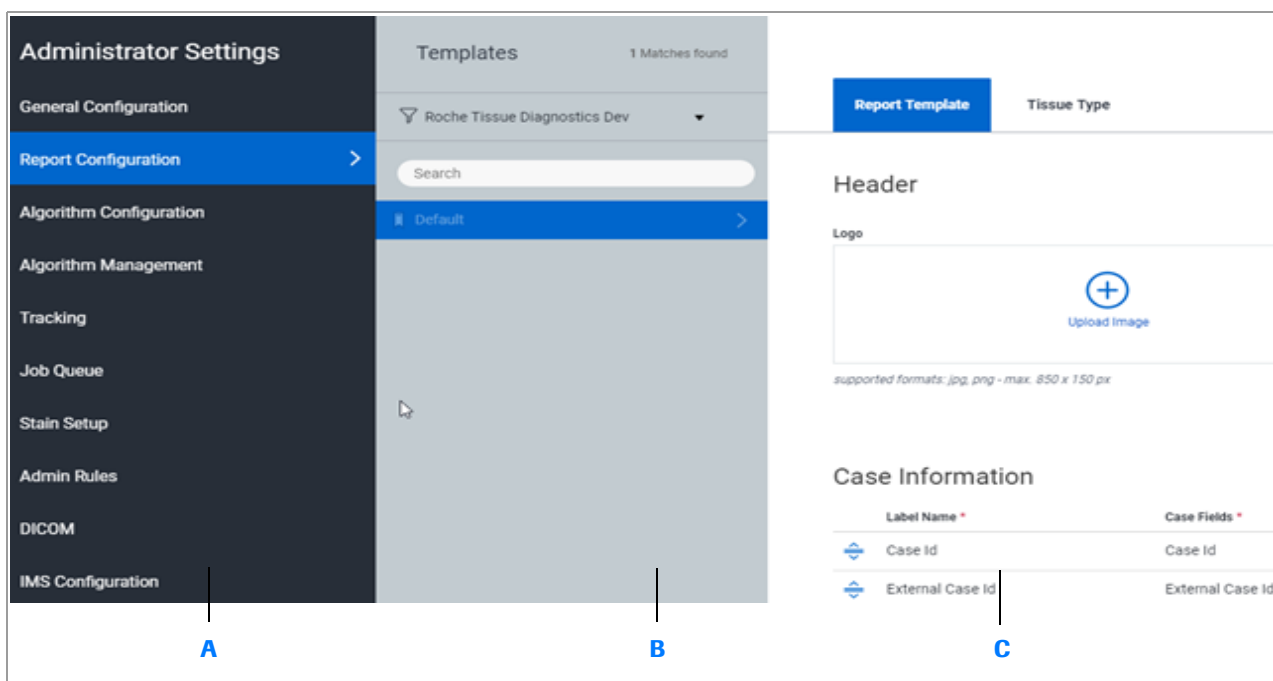

- A** Panel Administrator Settings con la lista de opciones de configuración.
- B** Visualización de la lista de plantillas.
- C** Visualización de los ajustes para las plantillas.


A  Pathology Lab
123 E. Main
Tucson, AZ 85626

B

Case Id	Patient Id	Age	Treating Physician	Date collected
XXXXXXXXXX	PPPPPPPPP	71	Doe John	11/02/2018
External Case Id	Gender	Ordering Facility	Date Received	Time collected
XXXXXXXXXX	Female	Lorem Ipsum	11/02/2018	10:58 PM
Patient Name	Patient Date of Birth	Referring Physician	Time Received	Report Date
Doe Jane	10/01/1947	Doe John	10:58 PM	11/02/2018

C **BREAST Case Report**
Case Notes
Lorem Ipsum

D **00-11 / Breast**
H&E / SUMMARY OF FINDINGS
XXXXXXXXXX 00-11-00-1 / FOV #1 (auto-selected)
Annotation Comments
Lorem Ipsum

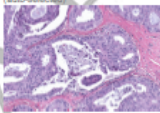


H&E / SUMMARY OF FINDINGS

Test	Result
H&E	
HER2	3+
ER	5.12%
PR	1.63%
KI-67	48.39%
PSI	25.36%

E **Individual Assay Section**
HER2 (4B6)

Results: **3+ Score**
Slide Notes: Lorem Ipsum
XXXXXXXXXX 00-11-00-2 / FOV #1 (auto-selected)
Annotation Comments
Lorem Ipsum

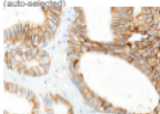

Computer-Assisted Pathological Score

= 3 Positive; < 2 Negative; = 2 Equivocal


DETAILED RESULT

Qualify	Average
Total Cell Count	4489
Stained Cell Count	2863
Non Stained Cell Count	1626

HER2 ASSAY INFORMATION / Duration of Fixation(mins): 10.0; Complete membrane staining: 3.0; Fixative: Alcohol; Time to Fixation(mins): 1.0; Sample adequate for analysis: Yes; Control results: Lorem Ipsum; Disclaimer: Lorem Ipsum

Estrogen Receptor (ER) (SP1)

Results: **5.12% positive**
Slide Notes: Lorem Ipsum
XXXXXXXXXX 00-11-00-3 / FOV #1 (auto-selected)
Annotation Comments
Lorem Ipsum

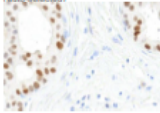

Computer-Assisted Pathological Score

=> 1 Favorable; < 1 Unfavorable;

DETAILED RESULT

Qualify	Average
Total Cell Count	4489
Stained Cell Count	2863
Non Stained Cell Count	1626

ER ASSAY INFORMATION / Duration of Fixation(mins): 10.0; Fixative: Alcohol; Time to Fixation(mins): 1.0; Sample adequate for analysis: Yes; Control results: Lorem Ipsum; Disclaimer: Lorem Ipsum

Progesterone Receptor (PR) (1E2)

Results: **1.63% positive**
Slide Notes: Lorem Ipsum

Computer-Assisted Pathological Score

F

XXXXXXXXXXXXX 10:58 PM UTC RUO Page 1 Of 2

- A** Encabezado del informe: Logotipo, dirección y número de teléfono y de fax de la empresa
- B** Información del caso: Case ID, External Case ID, Patient ID, Patient ID, Gender, Patient Date of Birth, Edad, Ordering Facility, Referring Physician, Treating Physician, Date Received, Time Received, Date collected, Time collected, Report Date
- C** Informe: Case Notes
- D** Summary of Findings: (El encabezado de la sección se puede editar) Tabla de resumen de resultados, región de interés (ROI) de la imagen de referencia
- E** Individual Assays: (El encabezado de la sección se puede editar) Scores, Slide Notes, imagen de ROI, comentarios de ROI, Información de la configuración de tinción
- F** Bloque de firma: Logo, Case ID, Digital Signature, Printed Signature, Date, Time, Page Number, Disclaimer, Disclaimer text (si es necesario), Custom label

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Gestión de los tipos de tejido para plantillas de informes

Contenidos de esta sección

Adición de un tipo de tejido a una plantilla (217)

Eliminación de un tipo de tejido de una plantilla (218)

Adición de un tipo de tejido a una plantilla

Puede añadir un tipo de tejido a una plantilla existente.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.
- El tipo de tejido que desea añadir a la plantilla del informe se ha creado en Admin Rules.

► Para añadir un tipo de tejido a una plantilla

- 1** Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente y una plantilla.
- 2** Seleccione el botón **Agregar** de la pestaña **Tissue Type** y, a continuación, seleccione un tejido de los que aparecen en la lista desplegable.
- 3** Seleccione el botón **SAVE**.
- 4** Para añadir tipos de tejido adicionales, repita estos pasos.

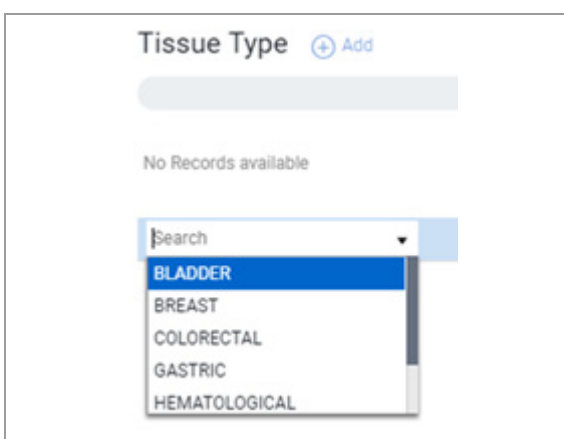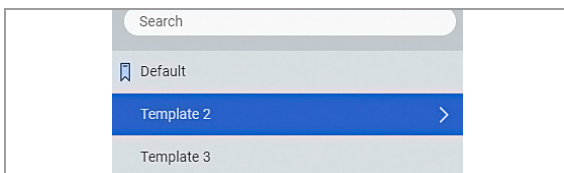

Eliminación de un tipo de tejido de una plantilla


Puede eliminar un tipo de tejido de una plantilla de informe.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para eliminar un tipo de tejido de una plantilla

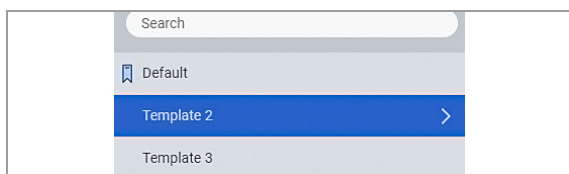


- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente y una plantilla de informe.
- 2 En la pestaña Tissue Type, seleccione el botón  situado al lado del tipo de tejido que desea eliminar.
- 3 Seleccione el botón **SAVE**.

Creación y modificación de plantillas de informe


Contenidos de esta sección

- Creación de una nueva plantilla de informe (219)
- Duplicación de una plantilla de informe existente (220)
- Modificación del encabezado del informe (221)
- Configuración de la información del caso y adición de las notas del caso (222)
- Configuración de las secciones Summary of Findings e Individual Assay (224)
- Configuración de la sección Gross Image and Description (226)
- Modificación de la sección Footer (227)
- Configuración de la sección Signature (228)

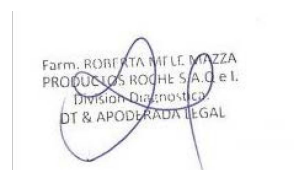

Creación de una nueva plantilla de informe

Puede crear nuevas plantillas de informe para tipos de tejido individuales o grupos de tipos de tejido. También puede crear plantillas para centros o clientes concretos, o usuarios específicos.



 Si desea basar su plantilla nueva en una que ya se haya creado, ahorre tiempo copiando una plantilla existente y realizando modificaciones en la copia. Consulte «Duplicación de una plantilla de informe existente».



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para crear una nueva plantilla de informe

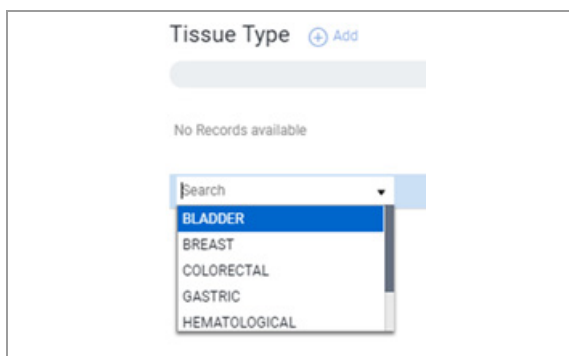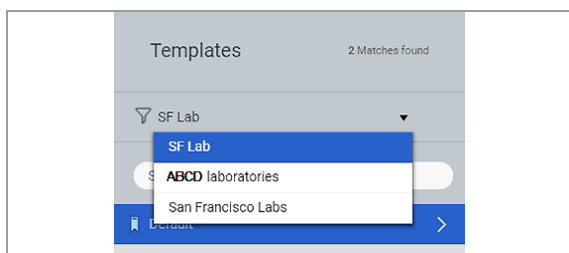


- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.
- 2 En el panel **Templates**, seleccione el botón **New**.
- 3 En el campo nuevo en la lista, introduzca el nombre de una plantilla y, a continuación, pulse **Enter** para añadirlo a la lista.
- 4 Si desea añadir un tipo de tejido a la plantilla, seleccione el botón **Add** en la pestaña **Tissue Type**, elija el tipo de tejido de la lista desplegable y, a continuación, seleccione el botón **SAVE**.
 - Para añadir otro tipo de tejido, seleccione el botón **Add**.

► **Temas relacionados**

- Modificación del encabezado del informe (221)
- Configuración de la información del caso y adición de las notas del caso (222)
- Configuración de las secciones **Summary of Findings** e **Individual Assay** (224)
- Configuración de la sección **Gross Image and Description** (226)
- Modificación de la sección **Footer** (227)

Duplicación de una plantilla de informe existente

Duplique una plantilla existente si solo necesita realizar pequeños cambios en una plantilla existente. Esto le proporciona un buen punto de inicio para una nueva.

 Las plantillas de un centro o cliente no se pueden duplicar para otro centro o cliente.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para duplicar una plantilla de informe existente


- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.

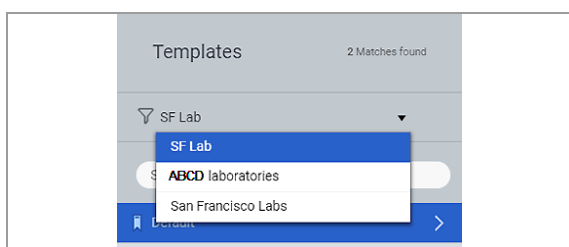

- 2 En el panel **Templates**, seleccione la plantilla que desea duplicar y, a continuación, el botón **Duplicate**.
→ Se muestra una entrada duplicada en la lista de plantillas.

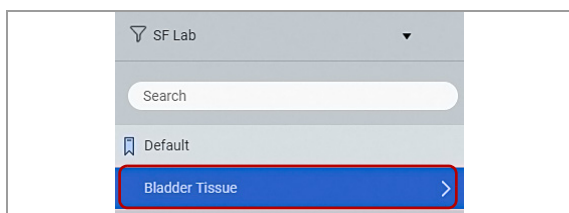

- 3 Edite el nombre de la plantilla nueva en el campo y pulse **Enter** para cambiar el nombre en la lista de plantillas.
- 4 En la pestaña **Tissue Type**, seleccione el botón **Add**. Seleccione un tipo de tejido de la lista y, a continuación, seleccione el botón **SAVE**.

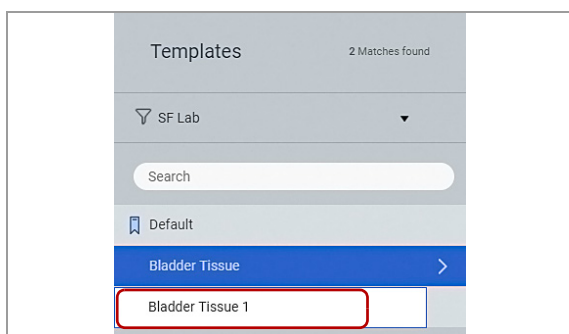

Farm. ROBFATA M.F.L. MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Temas relacionados

- Modificación del encabezado del informe (221)
- Configuración de la información del caso y adición de las notas del caso (222)
- Configuración de las secciones Summary of Findings e Individual Assay (224)
- Configuración de la sección Gross Image and Description (226)
- Modificación de la sección Footer (227)

Modificación del encabezado del informe

Se puede cambiar el logotipo y la dirección en el encabezado del informe.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.


Para modificar el encabezado del informe, realice cualquiera de los siguientes procedimientos:

- ▶ Para añadir un logotipo al encabezado ▶ (221)
- ▶ Para eliminar o sustituir un logotipo ▶ (222)
- ▶ Para añadir o editar una dirección ▶ (222)

▶ Para añadir un logotipo al encabezado

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.
- 2 En el campo **Logo** que se encuentra debajo de **Header**, seleccione el botón **Upload Image**.
- 3 Desplácese hasta el archivo del logotipo y seleccione el botón **Open**.
 - ❶ El archivo del logotipo puede ser un .jpeg o .png con una dimensión máxima de 850 x 150 píxeles.
- 4 Para visualizar el informe con los cambios, seleccione el botón **SAVE** y, a continuación, seleccione el botón **Preview**.



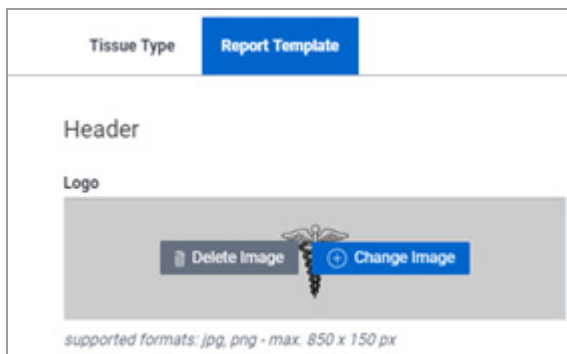

► Para eliminar o sustituir un logotipo

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.
- 2 Seleccione la pestaña **Report Template** y, a continuación, el logotipo en el cuadro **Logo**.
- 3 Para eliminar el logotipo actual sin sustituirlo, seleccione el botón **Delete Image**.
- 4 Para sustituir el logotipo actual, seleccione el botón **Change Image**.
 - En el cuadro de diálogo **Open**, desplácese hasta el archivo del logotipo y seleccione el botón **Open**.
 - ❶ El archivo del logotipo puede ser un .jpeg o .png con una dimensión máxima de 850 x 150 píxeles.
- 5 Para visualizar el informe con los cambios, seleccione el botón **SAVE** y, a continuación, seleccione el botón **Preview**.

► Para añadir o editar una dirección

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration > Report Template**.
- 2 Introduzca o modifique la información sobre la dirección en el campo **Address**.
- 3 Para visualizar el informe con los cambios, seleccione el botón **SAVE** y, a continuación, seleccione el botón **Preview**.

Configuración de la información del caso y adición de las notas del caso

Puede ordenar los campos y las filas en la sección de la información del caso del informe.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.



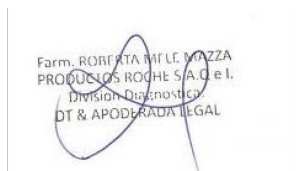

Para configurar la información del caso y las notas del caso, realice los siguientes procedimientos:

- Para configurar case information ► (223)
- Para añadir o eliminar notas del caso ► (224)



Case Information 		
	External Case Id	External Case Id NA
	Case Id	Case Id NA
	Patient Name	Patient Name Last Name First Name
	Patient Id	Patient Id NA
	Gender	Gender NA
	Patient Date of Birth	Date of Birth MM/DD/YYYY

► Para configurar case information

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente. Seleccione la pestaña **Report Template**.
- 2 En **Case Information**, reorganice el orden de las filas de campos si es necesario.
 - Seleccione el botón  para resaltar la fila y, a continuación, arrastre la fila hacia donde desee.
 - Seleccione el botón **SAVE**.
- 3 Active o desactive los campos si es necesario.
 - Seleccione la casilla de verificación **Active** situada al lado del campo para visualizar el campo en el informe.
 - Desmarque la casilla de verificación **Active** y no se mostrará el campo en el informe.
 - ❶ En una plantilla predeterminada, los campos no se pueden desactivar.
- 4 Cambie la etiqueta del campo, el campo del caso asociado o el formato, si es necesario.
 - Seleccione el botón .
 - Edite el campo **Label Name**.
 - En la lista desplegable **Case Fields**, seleccione un campo del caso.
 - En la lista desplegable **Format**, seleccione un formato. (Solo los campos del nombre, la fecha y la hora tienen opciones).
 - Seleccione el botón **DONE**.
- 5 Elimine un campo de la lista seleccionando el botón .
 - ❶ Los campos no se pueden eliminar de las plantillas predeterminadas.
- 6 Si ya se ha eliminado, como mínimo, 1 campo de la plantilla, puede añadir un campo.
 - Seleccione  y se mostrará una nueva fila en la parte inferior de la lista.
 - En el campo **Label Name**, introduzca la etiqueta de texto.
 - En la lista desplegable **Cases Fields**, seleccione el campo del caso apropiado.
 - En la lista desplegable **Format**, seleccione un formato. (Solo los campos del nombre, la fecha y la hora tienen opciones de formato).
 - Seleccione el botón **DONE**.
 - Si es más beneficioso para el flujo de trabajo, reordene los campos y las filas como se describe en el paso 1.

- Para visualizar el informe con los cambios, seleccione el botón **SAVE** y, a continuación, seleccione el botón **Preview**.

► Para añadir o eliminar notas del caso

- Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.
- Seleccione la pestaña **Report Template** y desplácese hasta la sección **Report**.
- Añada o elimine **Case Notes** del informe.
 - Seleccione la opción **Show** para incluir las notas del caso.
 - Seleccione la opción **Don't Show** para eliminar las notas del caso.
- Para visualizar el informe con los cambios, seleccione el botón **SAVE** y, a continuación, seleccione el botón **Preview**.



Configuración de las secciones Summary of Findings e Individual Assay

Puede configurar las secciones de hallazgos y ensayo para la plantilla del informe e incluir la región de interés (ROI) de la imagen de referencia.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

Para configurar las secciones Summary of Findings e Individual Assay, realice los siguientes procedimientos:

- Para configurar Resumen de hallazgos ► (225)
- Para configurar la sección de ensayo individual ► (225)


Farm. ROBERTA MILE MOZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

► Para configurar Resumen de hallazgos

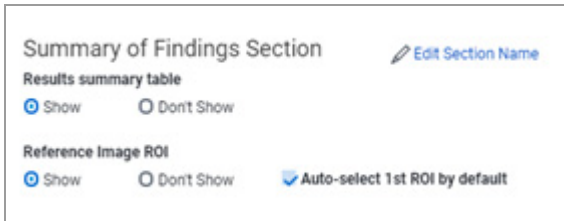

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.
- 2 Seleccione la pestaña **Report Template** y, en **Summary of Findings Section**, cambie el nombre de esta sección del informe si es necesario.
 - Seleccione **Edit Section Name**, escriba el cambio y seleccione **DONE**.
- 3 Añada o elimine **Results Summary table** del informe.
 - Seleccione el botón **Show** para incluirla.
 - Seleccione el botón **Don't Show** para eliminarla.
- 4 Añada o elimine **Reference Image ROI** del informe.
 - Para incluir Reference Image ROI, seleccione el botón **Show**.
 - Para eliminar Reference Image ROI, seleccione el botón **Don't Show**.
 - Para utilizar first ROI, seleccione el botón Show y, a continuación, seleccione la casilla de verificación **Auto-select 1st ROI by default**.
- 5 Para visualizar el informe con los cambios, seleccione el botón **SAVE** y, a continuación, seleccione el botón **Preview**.

► Para configurar la sección de ensayo individual

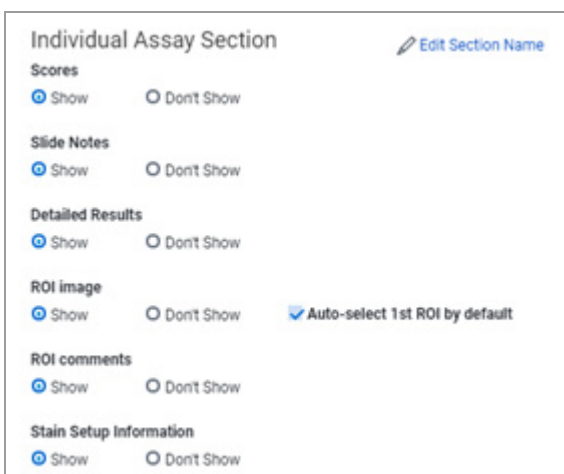

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.
- 2 Seleccione la pestaña **Report Template** y desplácese hasta **Individual Assay Section**.
- 3 Cambie el nombre de esta sección del informe si es necesario.
 - Seleccione **Edit Section Name**.
 - Escriba el cambio y seleccione **Done**.
- 4 Añada o elimine **Scores** del informe .
 - Para incluir las puntuaciones, seleccione el botón **Show**.
 - Para eliminar las puntuaciones, seleccione el botón **Don't Show**.

- 5 Añada o elimine **Slide Notes** del informe.
 - Para incluir las notas, seleccione el botón **Show**.
 - Para eliminar las notas, seleccione el botón **Don't Show**.
- 6 Añada o elimine **ROI image** del informe.
 - Para incluir ROI Image, seleccione el botón **Show**.
 - Para eliminar ROI Image, seleccione el botón **Don't Show**.
 - Para utilizar first ROI, seleccione la casilla de verificación **Auto-select 1st ROI by default**.
- 7 Añada o elimine **ROI comments** del informe.
 - Para incluir los comentarios, seleccione el botón **Show**.
 - Para eliminar los comentarios, seleccione el botón **Don't Show**.
- 8 Añada o elimine **Stain Setup Information** del informe.
 - Para incluir la configuración de la tinción, seleccione el botón **Show**.
 - Para eliminar la configuración de la tinción, seleccione el botón **Don't Show**.
- 9 Para visualizar el informe con los cambios, seleccione el botón **SAVE** y, a continuación, seleccione el botón **Preview**.


Configuración de la sección Gross Image and Description

Puede configurar las secciones para imagen macroscópica y la descripción para la plantilla del informe.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

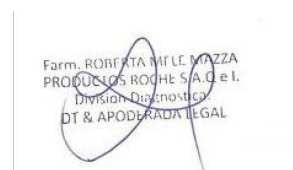

► Para configurar la sección **Gross Image and Description**

Gross Image and Description [Edit Section Name](#)

Gross Image

Show Don't Show

Gross Description

Show Don't Show

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.
- 2 Seleccione la pestaña **Report Template** y desplácese hasta la sección **Gross Image and Description**.
- 3 Cambie el nombre de esta sección del informe si es necesario.
 - Seleccione **Edit Section Name**, introduzca el nombre de esta sección del informe y seleccione el botón **DONE**.
- 4 Añada o elimine **Gross Image the or Gross Description** del informe.
 - Para incluir en el informe, seleccione el botón **Show**.
 - Para eliminar del informe, seleccione el botón **Don't Show**.
- 5 Para visualizar el informe con los cambios, seleccione el botón **SAVE** y, a continuación, seleccione el botón **Preview**.

Modificación de la sección Footer

Puede la sección de pie de página de la plantilla del informe.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

Footer Section Edit Section Name

Case Id
 Show Don't Show

Date
 Show Don't Show

Time
 Show Don't Show

Page Number
 Show Don't Show

Custom label

► Para configurar el pie de página

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.
- 2 Seleccione la pestaña **Report Template** y desplácese hasta **Footer Section**.
- 3 Cambie el nombre de esta sección del informe si es necesario.
 - Seleccione **Edit Section Name**, introduzca el nombre de esta sección del informe y, a continuación, seleccione el botón **DONE**.
- 4 Añada o elimine los subencabezados **Case ID**, **Date**, **Time** y **Page Number** del pie de página del informe.
 - Para eliminar case ID, seleccione el botón **Don't Show**.
 - Para incluir case ID, seleccione el botón **Show**.
- 5 En el campo **Custom label**, seleccione el botón Show y, a continuación, añada o edite custom label.
- 6 Para visualizar el informe con los cambios, seleccione el botón **SAVE** y, a continuación, seleccione el botón **Preview**.


Configuración de la sección Signature

Puede configurar la sección Signature de la plantilla del informe.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

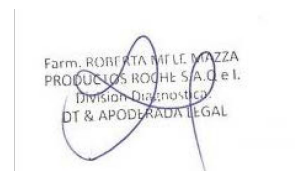

► Para configurar la sección de firmas

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.
- 2 En la pestaña **Report Template**, desplácese hasta **Signature Block Section**.
- 3 Cambie el nombre de esta sección del informe si es necesario.
 - Seleccione **Edit Section Name**, introduzca el nombre de esta sección del informe y, a continuación, seleccione el botón **DONE**.
- 4 Añada o elimine todos subencabezados Signature que ofrecen una opción de **Show** o **Don't Show** en cada subencabezado, por ejemplo, **Logo**, **Case ID** o **Digital Signature**.
- 5 En el cuadro **Disclaimer text**, añada o edite el descargo de responsabilidad.
 - ❶ El texto de descargo de responsabilidad se muestra solo si la opción **Show** está seleccionada.
- 6 Para visualizar el informe con los cambios, seleccione el botón **SAVE** y, a continuación, seleccione el botón **Preview**.

Gestión de plantillas del informe

Contenidos de esta sección

- Edición de una plantilla del informe predeterminada (229)
- Cambio del nombre de una plantilla del informe (230)
- Eliminación de una plantilla del informe (231)
- Desactivación de una plantilla del informe (231)
- Activación de una plantilla del informe (232)



Edición de una plantilla del informe predeterminada

Puede editar la plantilla del informe.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

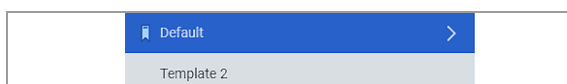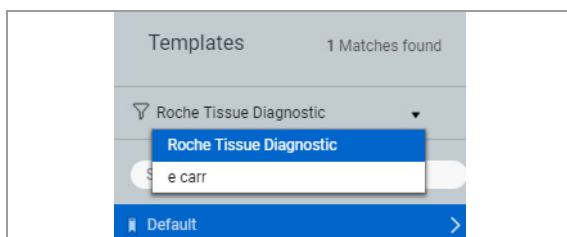

► Para editar una plantilla predeterminada

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.
- 2 Seleccione **Default** si se muestra más de una plantilla.
- 3 Seleccione la pestaña **Report Template** y realice los cambios en las secciones del informe.
- 4 Para visualizar el informe con los cambios, seleccione el botón **SAVE** y, a continuación, seleccione el botón **Preview**.

Cambio del nombre de una plantilla del informe

Cambie el nombre de una plantilla del informe para reutilizarla para otro centro o cliente. Puede cambiar el nombre de cualquier plantilla de informe existente, excepto una plantilla predeterminada.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cambiar el nombre de una plantilla del informe

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.
- 2 Seleccione la plantilla a la que desea cambiar el nombre y, a continuación, seleccione el botón **Rename**.

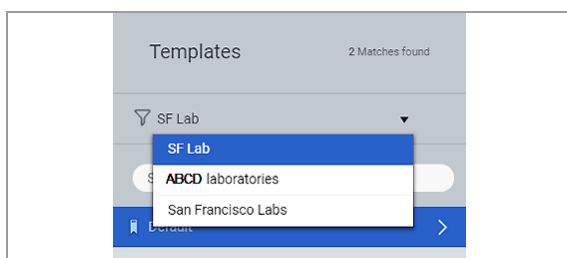

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUTOS ROCHE S.A. de I.
 DIVISION DIAGNOSTIC
 DT & APODERADA ILEGAL

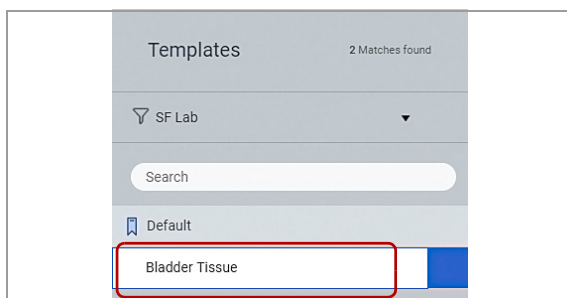

- 3 En el campo Template, edite el nombre de la plantilla y, a continuación, pulse **Enter** para cambiarlo en la lista.

Eliminación de una plantilla del informe

Puede eliminar cualquier plantilla del informe existente, excepto una plantilla predeterminada o desactivada.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para eliminar una plantilla del informe

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.
- 2 Seleccione la plantilla que desea eliminar y, a continuación, seleccione el botón **Delete**.
 - Se muestra una notificación que le indica que confirme la eliminación.
- 3 Seleccione **Yes** para confirmar o **No** para cancelar.
 - ❗ Una plantilla eliminada NO SE PUEDE recuperar.

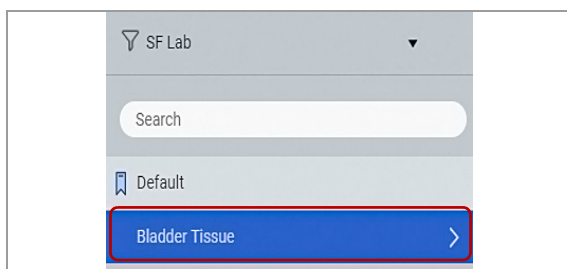

Desactivación de una plantilla del informe

Puede desactivar una plantilla del informe si desea que deje de aparecer como una opción para un patólogo. Se puede desactivar cualquier plantilla del informe, excepto una plantilla predeterminada.



Se puede volver a activar una plantilla desactivada. Consulte «Activación de una plantilla del informe».




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para desactivar una plantilla del informe

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.

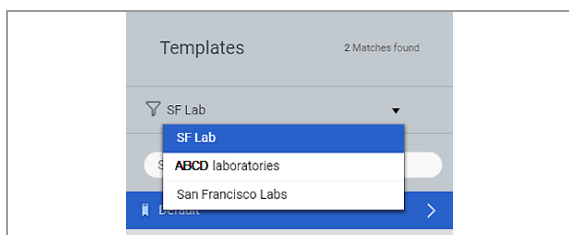

- 2 Seleccione la plantilla que desea desactivar y, a continuación, seleccione el botón **Deactivate**.
 - El nombre de la plantilla está atenuado y la plantilla dejará de aparecer como una opción para el patólogo.

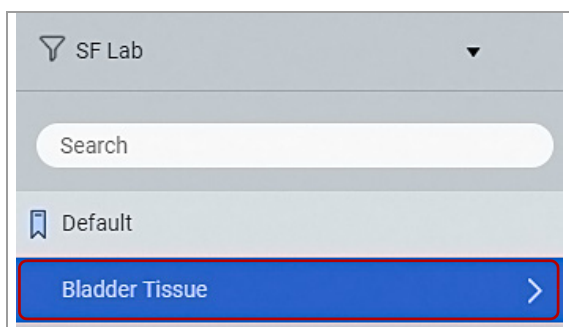


Activación de una plantilla del informe

Si decide que desea utilizar una plantilla que ha desactivado, puede volver a activarla.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

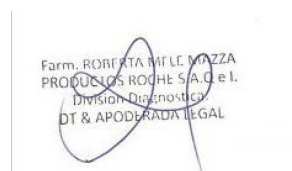


► **Para volver a activar una plantilla del informe**

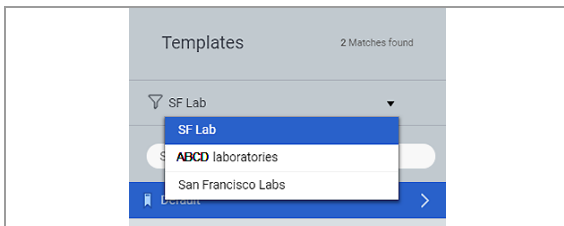

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Report Configuration** y, a continuación, seleccione un centro o cliente.

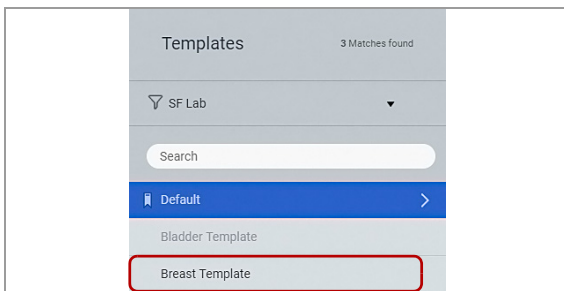

- 2 Seleccione la plantilla que desea volver a activar y, a continuación, seleccione el botón **Activate**.
→ El nombre de la plantilla deja de estar atenuado y la plantilla aparecerá como una opción para el patólogo.

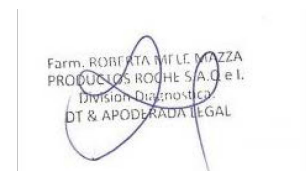

Configuración del catálogo de algoritmos


Contenidos de esta sección

Acerca de la configuración de algoritmos (234)

Configuración de los algoritmos (234)

Acerca de la configuración de algoritmos

En uPath software se ha instalado un conjunto de algoritmos. Utilice la pantalla Configuración de algoritmos para añadir, eliminar, desactivar y volver a activar los algoritmos proporcionados por Roche.

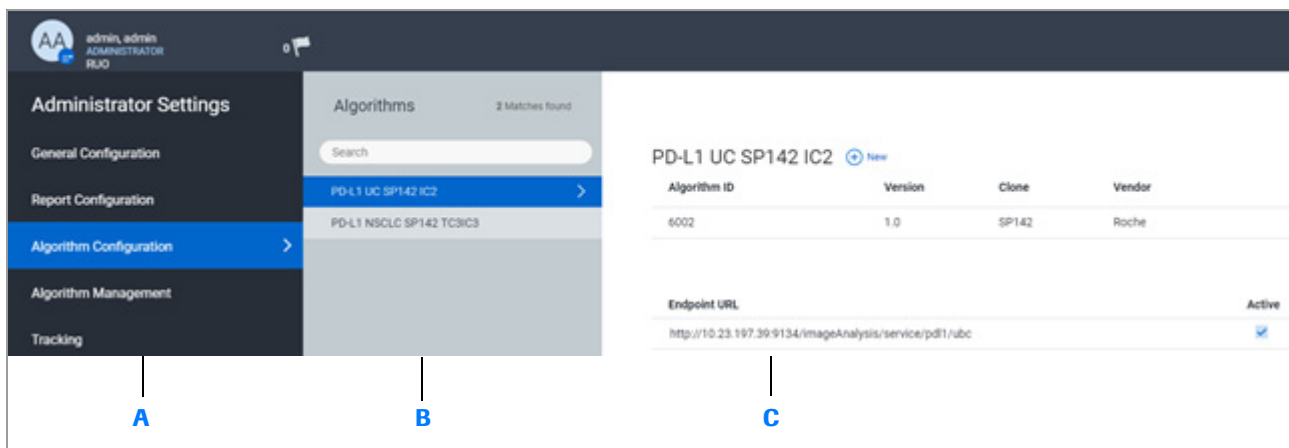

A Panel Administrator Settings con la lista de opciones de configuración.

B Selección de la lista de algoritmos.

C Visualización de los ajustes de algoritmos.

Configuración de los algoritmos

Contenidos de esta sección

Añadición de un nuevo algoritmo (234)

Eliminación de un algoritmo (235)

Cambio del estado de activación de un algoritmo (236)

Adición de un nuevo algoritmo

Es posible añadir algoritmos a uPath software.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para añadir un algoritmo

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Algorithm Configuration**.
- 2 Seleccione el botón **New** situado en la parte inferior del panel **Algorithms**.
- 3 Introduzca la URL del servicio web del nuevo algoritmo en el campo **Endpoint URL**.
- 4 Seleccione la casilla de verificación **Active** y, a continuación, seleccione **DONE**.

► Temas relacionados

- Acerca de agrupaciones de pronósticos y parámetros de salida (238)
- Eliminación de un algoritmo (235)
- Cambio del estado de activación de un algoritmo (236)

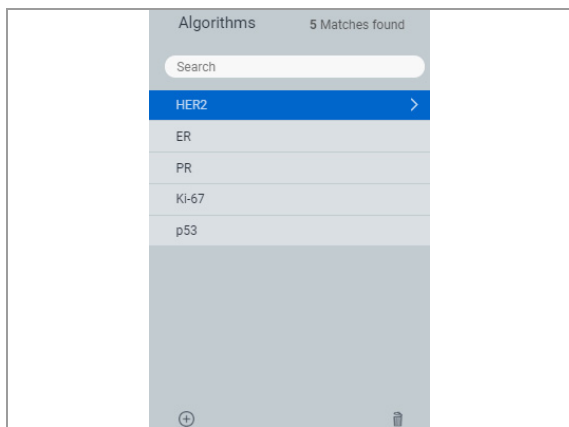


Eliminación de un algoritmo


Puede eliminar un algoritmo existente.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

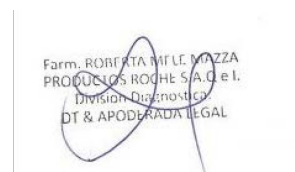

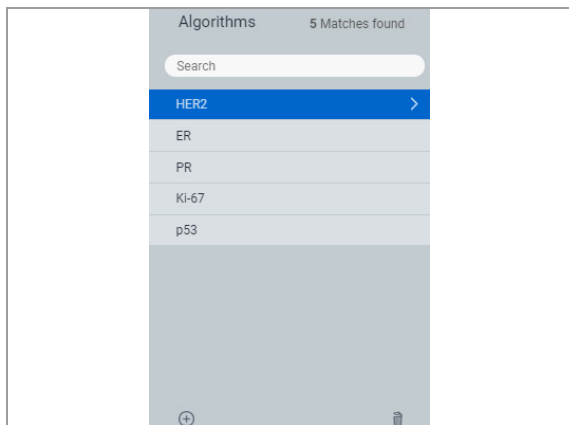

► Para eliminar un algoritmo

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Algorithm Configuration**.
- 2 Seleccione el algoritmo que desea eliminar y, a continuación, seleccione el botón **Delete**.
- 3 Confirme la eliminación cuando aparezca la notificación.
 - Un algoritmo eliminado no se puede recuperar.

📖 Temas relacionados

- Acerca de agrupaciones de pronósticos y parámetros de salida (238)
- Adición de un nuevo algoritmo (234)
- Cambio del estado de activación de un algoritmo (236)

Cambio del estado de activación de un algoritmo

Puede desactivar un algoritmo si desea que deje de aparecer como una opción para un patólogo.

💡 Se puede volver a activar un algoritmo desactivado. Consulte «Reactivación de un algoritmo».



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cambiar el estado de activación de un algoritmo

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Algorithm Configuration**.
- 2 En el panel **Algorithms**, seleccione un algoritmo y, a continuación, haga lo siguiente:
 - Desmarque la casilla de verificación **Active** para desactivar el algoritmo.
 - Seleccione la casilla de verificación **Active** para activar el algoritmo.



Temas relacionados

- Acerca de agrupaciones de pronósticos y parámetros de salida (238)
- Eliminación de un algoritmo (235)
- Cambio del estado de activación de un algoritmo (236)



Farm. ROBERTA MITLE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. Q. e. l.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Gestión de algoritmos

Contenidos de esta sección

Acerca de agrupaciones de pronósticos y parámetros de salida (238)

Acerca de agrupaciones de pronósticos (239)

Configuración de agrupaciones de pronósticos (239)

Acerca de agrupaciones de pronósticos y parámetros de salida

Roche establece las agrupaciones de pronósticos y los rangos de referencia para los algoritmos de puntuación y no se pueden cambiar. Sin embargo, se pueden crear para anulaciones de puntuaciones Free Text puntuadas manualmente.

Elija [Administrator Settings > Algorithm Management](#) y, a continuación, seleccione el marcador que desea (por ejemplo, PD-L1) y Scoring Type (por ejemplo, [Roche 6002](#) para los algoritmos de puntuación de Roche, [Free Text](#) para la puntuación manual o [None](#) para que no haya puntuación).

The screenshot shows the Roche uPath Administrator Settings interface. The left sidebar contains the 'Administrator Settings' menu with 'Algorithm Management' selected. The main content area is divided into two tabs: 'Reference Ranges' and 'Output Parameters'. The 'Prognostic Groupings' table is visible, showing parameters like IC% with operators >= and <, and reference ranges of 5. The table has columns for Parameter Name, Operator, Reference Range, Prognostic Groupings, and Color.

Parameter Name *	Operator *	Reference Range *	Prognostic Groupings *	Color *
IC%	>=	5	Expression	
IC%	<	5	Expression	

- A** Panel Administrator Settings con la lista de opciones de configuración.
- B** Selección de la lista de algoritmos.
- C** Establezca los rangos de referencia para las agrupaciones de pronósticos y los parámetros de salida para los informes.
- D** Visualización de los ajustes para las agrupaciones de pronósticos.

Acerca de agrupaciones de pronósticos

Cuando un patólogo analiza un portaobjetos, se muestra la Prognostic Grouping para un determinado rango de referencia del portaobjetos. Prognostic Groupings se basan en la relación entre los parámetros y los valores del rango de referencia.

Los rangos de referencia para el algoritmo de puntuación se refiere a un valor internamente relevante para el algoritmo.

En la agrupación de pronóstico de muestra, las células inmunes presentes se expresan en porcentaje si el valor de **IC%** es superior a o igual a 5, o inferior a 5.

Prognostic Groupings				
Parameter Name *	Operator *	Reference Range *	Prognostic Groupings *	Color *
IC%	>=	5	Expression	
IC%	<	5	Expression	

Configuración de agrupaciones de pronósticos

Contenidos de esta sección


Adición de una agrupación de pronósticos para puntuación manual (239)

Edición de una agrupación de pronósticos de puntuación manual (241)

Eliminación de una agrupación de pronósticos de puntuación manual (242)

Edición de parámetros de salida para los tipos de algoritmos de puntuación (243)

Adición de una agrupación de pronósticos para puntuación manual

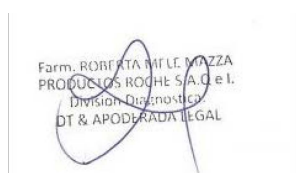

Solo puede definir agrupaciones de pronósticos y rangos de referencia personalizados para los tipos de puntuación Free Text. Los rangos de referencia siempre se refieren a una puntuación manual que determina el patólogo.

Puede que los rangos de referencia personalizados solo utilicen el operador igual (=).




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.


► Para añadir una nueva Agrupación de pronósticos

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Algorithm Management > Algorithms** y, a continuación, seleccione un centro o cliente de la lista desplegable.

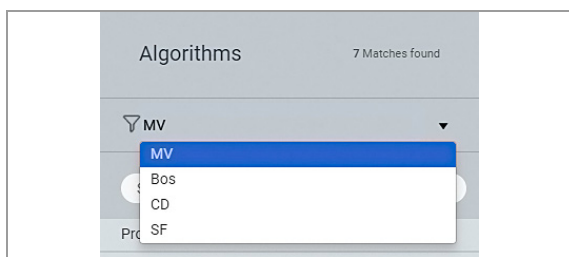


- 2 Amplíe el tipo de tejido que desea en el menú de tipos de tejido.

- ❶ Solo se pueden ampliar los tipos de tejido que tienen algoritmos asociados.


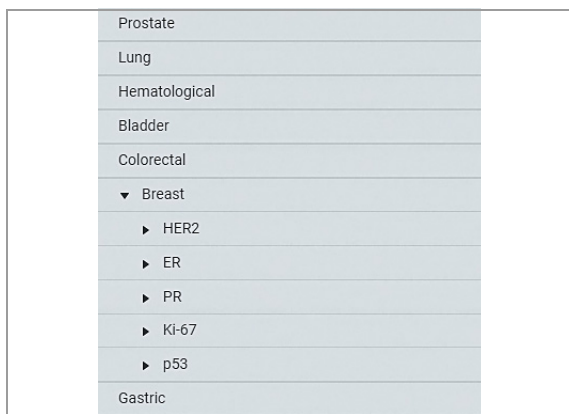


- 3 Amplíe el biomarcador de su elección situado debajo del tipo de tejido ampliado y seleccione **Free Text**.

- Se muestran los tipos de puntuación para el biomarcador.

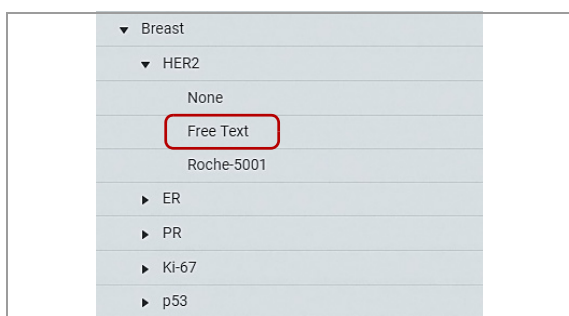

- 4 Seleccione el botón **New** en la sección **Prognostic Groupings** y, a continuación, rellene sus valores en la fila de pronósticos.

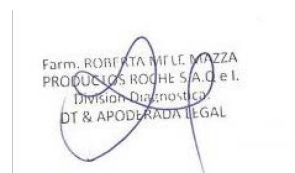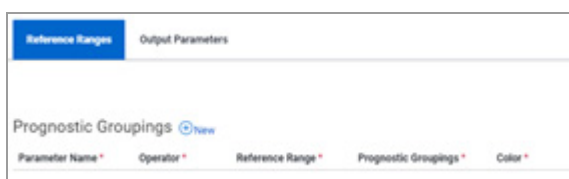

Parameter Name *

Percent Positivity

Reference Range *

25

Prognostic Groupings *

Equivocal

Positive

Negative

Equivocal

Favorable

Unfavorable

Color *

Red

Red

Orange

Yellow

Green

Aqua

✓ DONE

- 5 En el campo **Parameter Name**, introduzca el nombre del parámetro de puntuación, por ejemplo, 25 Percent Positivity.
- 6 Introduzca el valor del parámetro de puntuación en el campo **Reference Range**.
- 7 Seleccione un pronóstico de la lista desplegable **Prognostic Groupings**.
- 8 Seleccione un color de la lista desplegable **Color** y, a continuación, seleccione **DONE**.

Temas relacionados


- Edición de una agrupación de pronósticos de puntuación manual (241)
- Eliminación de una agrupación de pronósticos de puntuación manual (242)
- Edición de parámetros de salida para los tipos de algoritmos de puntuación (243)

Edición de una agrupación de pronósticos de puntuación manual

Puede editar las Prognostic Groupings que se hayan añadido para un tipo de puntuación Free Text.




Roche establece las Prognostic Groupings para el algoritmo de puntuación automatizada y no se pueden cambiar.

Puede que los rangos de referencia personalizados solo utilicen el operador igual (=).

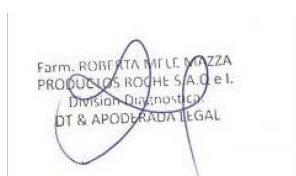


Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

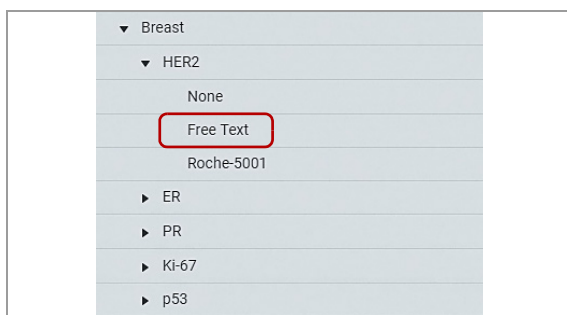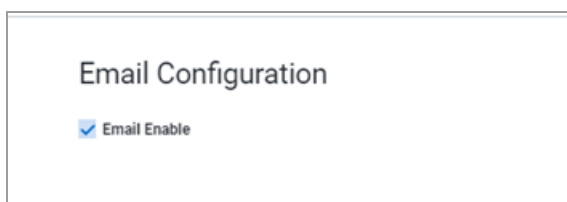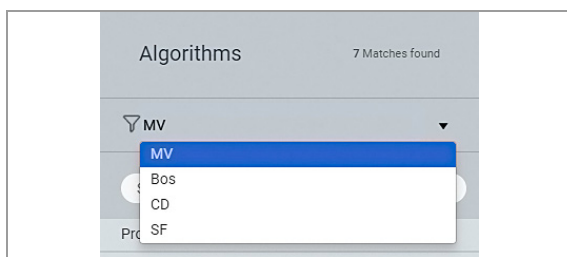

► Para editar una Agrupación de pronósticos

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Algorithm Management > Algorithms** y, a continuación, seleccione un centro o cliente de la lista desplegable.
- 2 Amplíe el tipo de tejido de su elección en el menú de tipos de tejido.
 - ❶ Solo se pueden ampliar los tipos de tejido que tienen algoritmos asociados.
- 3 Amplíe el biomarcador de su elección y seleccione **Free Text** situado debajo del tipo de tejido ampliado.
- 4 Seleccione el botón  en la fila Prognostic Grouping situada al lado de la opción que es necesario editar. Realice cualquiera de las operaciones siguientes:
 - **Parameter Name:** Cambie el nombre del parámetro de puntuación.
 - **Reference Range:** Cambie el valor de referencia.
 - **Prognostic Groupings:** Seleccione un pronóstico diferente de la lista, si es necesario.
 - **Color:** Seleccione un color diferente.
- 5 Seleccione el botón **DONE**.

Eliminación de una agrupación de pronósticos de puntuación manual

Se pueden eliminar las Prognostic Groupings que se hayan añadido para un tipo de puntuación Free Text.

No se pueden eliminar las Prognostic Groupings para el algoritmo de puntuación automatizada.






Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

Farm. ROBERTA INFLE. MOZZA
 PRODUCOS ROCHE S.A. C.e.l.
 División Diagnóstica
 DT & APODERADA LEGAL

► Para eliminar una agrupación de pronósticos

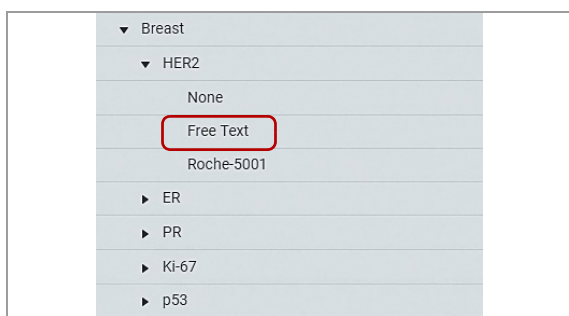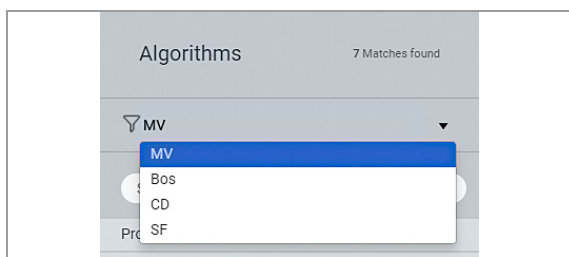

- 1 Seleccione **User settings > Administrator Settings > Algorithm Management > Algorithms** y, a continuación, seleccione un centro o cliente de la lista desplegable.
- 2 Amplíe el tipo de tejido de su elección en el menú de tipos de tejido.
 - ❶ Solo se pueden ampliar los tipos de tejido que tienen algoritmos asociados.
- 3 Amplíe el biomarcador de su elección situado debajo del tipo de tejido ampliado.
- 4 Seleccione **Free Text**.
 - Se muestra la pantalla **Prognostic Groupings**.
- 5 Seleccione el botón  en la fila **Prognostic Groupings** situada al lado de la agrupación que desea eliminar.
 - ❶ Una agrupación eliminada NO SE PUEDE recuperar.
- 6 En la notificación, seleccione **Yes** para confirmar o **No** para cancelar.




Edición de parámetros de salida para los tipos de algoritmos de puntuación

Puede editar los parámetros de salida para cada algoritmo. Existen diferentes parámetros de salida para la puntuación manual y para los algoritmos de puntuación automatizada.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

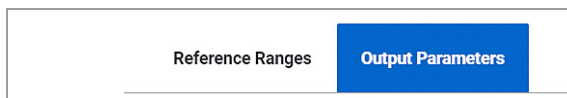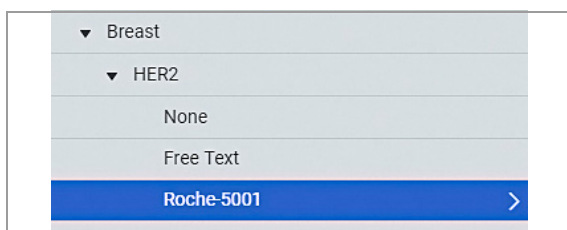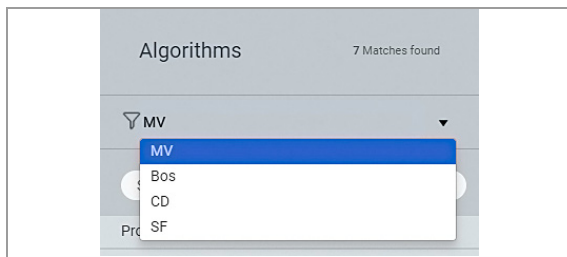

Label	Show in analysis view	Show in report
Quality	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Total Cell Count	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Completely Stained Cell Count	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Partially Stained Cell Count	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Non Stained Cell Count	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strong Intensity Cell Count	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medium Intensity Cell Count	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weak Intensity Cell Count	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Median Intensity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Membrane Score	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

► Para editar los parámetros de salida

- 1 Seleccione **User settings > Administrator Settings > Algorithm Management > Algorithms** y, a continuación, seleccione un centro o cliente de la lista desplegable.
- 2 Amplíe el tipo de tejido de su elección en el menú de tipos de tejido.
 - ❗ Solo se pueden ampliar los tipos de tejido que tienen algoritmos asociados.
- 3 Amplíe el biomarcador de su elección situado debajo del tipo de tejido ampliado.
- 4 Seleccione el tipo de puntuación.
- 5 Seleccione la pestaña **Output Parameters**.
- 6 Para cada parámetro, seleccione o desmarque las casillas de verificación para cada preferencia de salida.
 - **Show in analysis:** Seleccione la casilla de verificación que desea incluir en la vista de análisis o desmarque la casilla de verificación que desea excluir de la vista de análisis.
 - **Show in report:** Seleccione la casilla de verificación que desea incluir en los informes de los patólogos o desmarque la casilla de verificación que desea excluir de los informes de los patólogos.
 - ❗ Los parámetros varían para cada algoritmo.
- 7 Seleccione el botón **SAVE**.

Farm. ROBERTA MITTE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Seguimiento del software e informes de auditoría

Contenidos de esta sección

Acerca de la configuración del seguimiento y la generación de informes (246)

Configuración del seguimiento del software (247)

Gestión de los informes de uso (248)

Gestión del informe de auditoría (250)




Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A. C.e.l.
Division Diagnostico
DT & APODERADA LEGAL

Acerca de la configuración del seguimiento y la generación de informes

uPath software está instalado con una función que le permite realizar un seguimiento de las acciones en las operaciones predefinidas. Utilizando este seguimiento registrado, se generan dos tipos de informes: Audit Report y Usage Report.

Los informes de auditoría y de uso se generan utilizando datos de auditoría. El Usage Report se centra en imágenes analizadas, imágenes visualizadas y análisis de imágenes para un rango de fechas especificado.

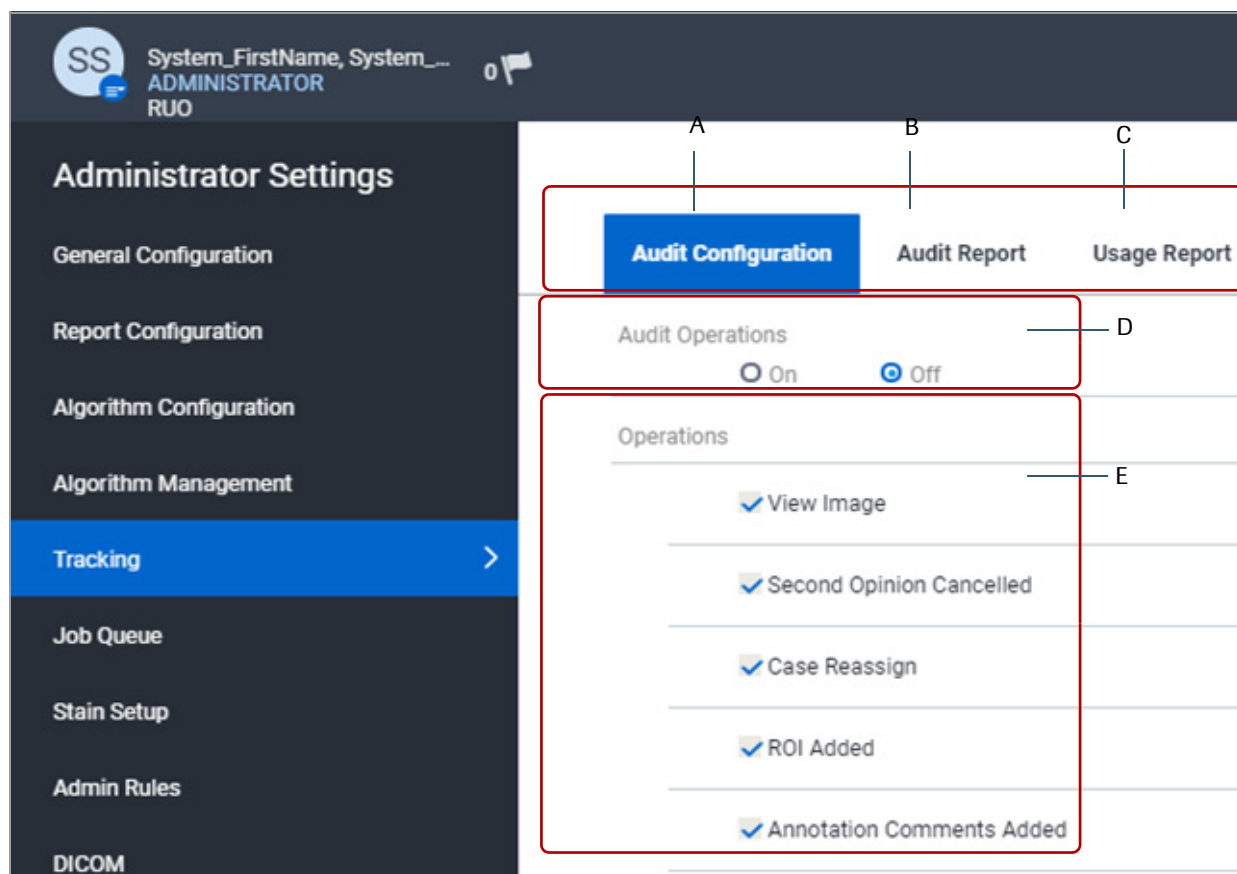

- A** Configuración de Audit Operations y configuración de lo que aparecerá en los informes.
- B** Generación y exportación de Audit Report basándose en un marco temporal predefinido.
- C** Generación de Usage Report por fecha y selección de las imágenes analizadas, las imágenes visualizadas y el análisis de imágenes para el informe.
- D** Activación de la función de seguimiento del software.
- E** Selección de las tareas y los datos incluidos en Audit Report.

Configuración del seguimiento del software

Contenidos de esta sección

Activación y desactivación del seguimiento del software (247)

Selección de las operaciones de software de uPath software de las que se realiza un seguimiento (247)

Activación y desactivación del seguimiento del software

Puede activar o desactivar la función de seguimiento.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para activar o desactivar la función de seguimiento

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Tracking > Audit Configuration**.
- 2 Seleccione el botón **On** para activar el seguimiento o seleccione el botón **Off** para desactivar el seguimiento.
- 3 Seleccione el botón **SAVE**.

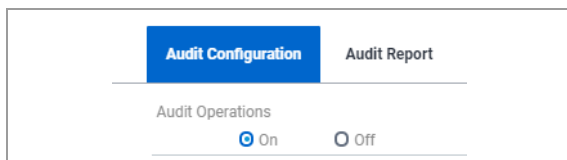

Selección de las operaciones de software de uPath software de las que se realiza un seguimiento

Puede establecer las operaciones de uPath software de las que se realiza un seguimiento, a efectos de auditoría.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para seleccionar las operaciones de las que se realiza un seguimiento

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Tracking > Audit Configuration**.
- 2 En la sección **Operations**, desmarque las casillas de verificación de las operaciones de las que no desea que se realice un seguimiento.
 - ❶ Se requiere realizar un seguimiento de las operaciones **View Image** y **ROI Analyzed**.
- 3 Seleccione el botón **SAVE**.

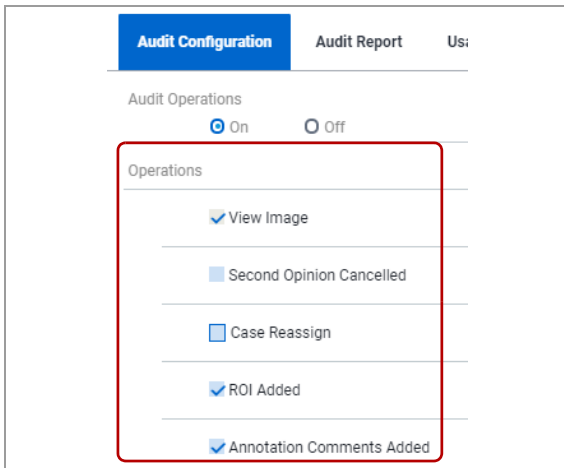


Gestión de los informes de uso

Contenidos de esta sección

Acerca del informe de uso (249)

Generación de un informe de uso (250)

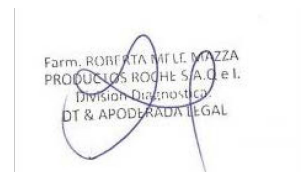


Acerca del informe de uso

Puede especificar el Usage Report para incluir solo eventos de análisis de imágenes, solo eventos de visualización de imágenes o ambos. El Usage Report incluye información para cada evento del caso.

Per Click Usage Report

Generated By: N., Ed				Date: 28-03-2018 02:27 AM GMT			
Usage Report for: Image Viewing and Analysis							
From: 27-02-2018		To: 27-03-2018		Total No of clicks: 9			
Date	Action	User Name	Case ID	Specimen	Slide ID	Algorithm	Marker
27-03-2018 09:50 PM GMT	Image Analyzed	Matho, Susan	12845	00-1	Ventana_ER_UltraView	5002	ER
26-03-2018 08:58 PM GMT	Image Analyzed	Matho, Susan	12900	00-1	Ventana_Ki67_UltraView	5004	Ki-67
26-03-2018 08:51 PM GMT	Image Analyzed	Matho, Susan	12900	00-1	Ventana_PR_UltraView	5003	PR
26-03-2018 08:49 PM GMT	Image Analyzed	Matho, Susan	12900	00-1	Ventana_ER_UltraView	5002	ER
22-03-2018 10:22 PM GMT	Image Analyzed	Smith, Mark	11111111	00-1	Ventana_Ki67_UltraView	5005	p53
22-03-2018 10:00 PM GMT	Image Analyzed	Matho, Susan	12458	00-1	Ventana_ER_UltraView	5005	p53
20-03-2018 08:27 PM GMT	Image Analyzed	Matho, Susan	12456	00-1	Ventana_PR_UltraView	5003	PR
16-03-2018 08:43 AM GMT	Image Analyzed	Boda, Prakash	PCASE	00-1	Ventana_PR_UltraView	5003	PR
16-03-2018 08:39 AM GMT	Image Analyzed	Boda, Prakash	PCASE	00-1	Ventana_ER_UltraView	5002	ER

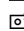 Ejemplo de Usage Report

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

Generación de un informe de uso

Puede generar un Usage Report para un rango de fechas especificado (las fechas de inicio y final son obligatorias). Puede especificar si desea incluir solo eventos de análisis de imágenes, solo eventos de visualización de imágenes o ambos, eventos de visualización y de análisis de imágenes (se requiere una elección).



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para generar un informe de uso

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Tracking > Usage Report**.
- 2 En los campos **Start Date** y **End Date**, seleccione una fecha.
- 3 En la lista desplegable **Usage By**, seleccione una opción.
 - ⓘ Esta selección es obligatoria.
- 4 Desplácese y seleccione el botón **GENERATE REPORT**.
 - Recibirá un correo electrónico con un enlace para descargar el informe.

uPath enterprise software no es compatible con la recuperación en caso de catástrofe, por lo que es recomendable que se haga una copia de seguridad de todos los informes que se hayan generado.

Gestión del informe de auditoría

Contenidos de esta sección

Acerca del informe de auditoría (251)

Generación de un informe de auditoría (252)

Acerca del informe de auditoría

El Audit Report incluye los identificadores de date, action, user name, case, specimen y slide de la configuración de auditoría predefinida.

AVISO

Los informes de auditoría contienen información confidencial sobre la salud (PHI)

- ▶ Tome las medidas de precaución oportunas a la hora de compartir los informes de auditoría, dado que contienen información confidencial sobre la salud (PHI).




Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Audit Report

From **27-02-2018** To **27-03-2018**

Date	Action	User Name	Case ID	Specimen ID	Slide ID
27-03-2018 11:56 PM	Slide Excluded	Matho, Susan	12901	00-1	Ventana_HE_Sy mphony
27-03-2018 11:51 PM	Reject Slide	Misto, Susan	12901	00-1	Ventana_HE_Sy mphony
27-03-2018 11:48 PM	Reject Slide	Matho, Susan	12901	00-2	Ventana_Ki67_U ltraView
27-03-2018 10:32 PM	Sign-out Case	Matho, Susan	12845		
27-03-2018 10:32 PM	Generate Report	System	12845		
27-03-2018 10:32 PM	Generate Report	Matho, Susan	12845		
27-03-2018 10:32 PM	Generate Report	Matho, Susan	12845		
27-03-2018 10:31 PM	Generate Report	Matho, Susan	12845		
27-03-2018 10:31 PM	Generate Report	Matho, Susan	12845		
27-03-2018 10:30 PM	Generate Report	Matho, Susan	12845		
27-03-2018 10:20 PM	Reject Slide	Matho, Susan	12458	00-1	Ventana_HE_Sy mphony
27-03-2018 10:06 PM	Annotation 6840 Comment Added - ROI 3 comment	Matho, Susan	12845	00-1	Ventana_ER_Ult raView
27-03-2018 10:05 PM	Slide Score Comment Added - This is comment	Matho, Susan	12845	00-1	Ventana_ER_Ult raView
27-03-2018 10:00 PM	Slide Excluded	Matho, Susan	12456	00-1	Ventana_ER_Ult raView
27-03-2018 09:55 PM	ROI 6862 added	Matho, Susan	12845	00-1	Ventana_ER_Ult raView
27-03-2018 09:54 PM	ROI 6840 added	Matho, Susan	12845	00-1	Ventana_ER_Ult raView
27-03-2018 09:50 PM	ROI Analyzed	Matho, Susan	12845	00-1	Ventana_ER_Ult raView
27-03-2018 09:50 PM	ROI Analyzed	Matho, Susan	12845	00-1	Ventana_ER_Ult raView

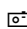 Ejemplo de Audit Report

Generación de un informe de auditoría

Puede generar un audit report que indique las acciones realizadas en los casos y los portaobjetos.

Farm. ROBERTA NITILE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. S.r.l.
Division Diagnostico
DT & APODERADA LEGAL



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para generar un informe de auditoría

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Tracking > Audit Report**.
- 2 En los campos **Start Date** y **End Date**, seleccione una fecha.
- 3 (opcional) Para filtrar el informe por usuario, introduzca un nombre en el campo de búsqueda **User Name** y seleccione el usuario coincidente.
- 4 (opcional) Para filtrar el informe por case ID, introduzca un ID del caso en el campo de búsqueda **Case ID** y seleccione el caso coincidente.
- 5 Seleccione el formato de salida del informe, ya sea un formato .pdf o .csv.
- 6 Seleccione el botón **GENERATE REPORT**.
→ Recibirá un correo electrónico con un enlace para descargar el informe.

💡 uPath enterprise software no es compatible con la recuperación en caso de catástrofe, por lo que es recomendable que se haga una copia de seguridad de todos los informes que se hayan generado.

Gestión de la cola de tareas de la imagen

Contenidos de esta sección


Acerca de la cola de tareas (254)

Gestión de la cola de tareas (254)

Revisión de tareas fallidas (257)

Acerca de la cola de tareas

En el análisis de toda la imagen, se analiza la imagen del portaobjetos mientras se está definiendo la región de interés. Dado que el análisis de toda la imagen puede llevar cierto tiempo, se puede supervisar y gestionar el progreso en la pantalla [Job Queue](#).

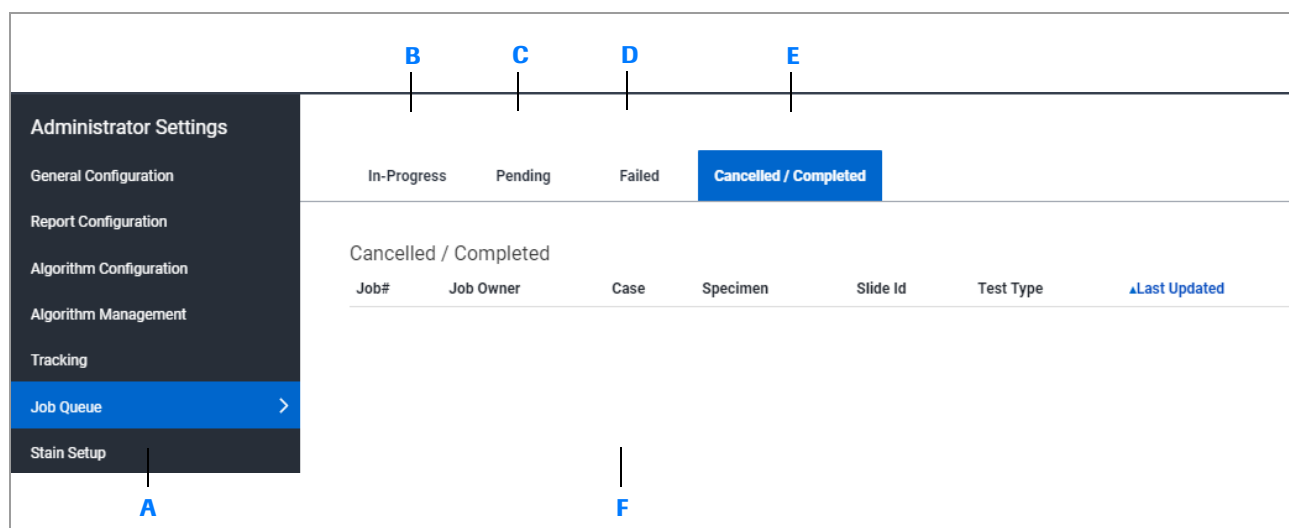

- A** Panel Administrator Settings con la opción de configuración de Job Queue.
- B** Visualización de las tareas que se están analizando en la pestaña In-Progress.
- C** Visualización de las tareas que están en análisis pendiente en la pestaña Pending.
- D** Visualización de las tareas que tienen análisis fallido en la pestaña Failed.
- E** Visualización de las tareas que se han cancelado o completado en la pestaña Cancelled/Completed.
- F** Visualización de los detalles de la tarea.

Gestión de la cola de tareas

Contenidos de esta sección

Revisión y clasificación de las tareas en curso (255)

Cancelación de las tareas en curso (255)

Revisión de tareas pendientes (256)

Cancelación de tareas pendientes (256)

Revisión y clasificación de las tareas en curso

Puede ver una lista de las tareas de análisis de toda la imagen del portaobjetos que se han iniciado, pero que aún no se han completado.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para revisar y ordenar tareas en curso

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Job Queue > In-Progress**.
- 2 Seleccione el botón Refresh para actualizar la lista.
- 3 Seleccione el nombre de una columna para clasificar la lista en orden ascendente o descendente. La columna se ordena cada vez que seleccione el encabezado de la columna. La flecha indica el orden de clasificación.
 - ❶ Puede clasificar utilizando las columnas **Job#**, **Job Owner**, **Case**, **Test Type** o **Start Date Time**. Las otras columnas no se pueden clasificar.

▲Job Owner

Cancelación de las tareas en curso

Puede cancelar una tarea en curso si hay una tarea de mayor prioridad. Las tareas canceladas se pueden reiniciar desde la pestaña **Cancelled / Completed**.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cancelar una tarea en curso

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Job Queue > In-Progress** y seleccione la tarea que desea cancelar.
- 2 Seleccione el botón **Cancel Job**.

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A.C. e.l.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Revisión de tareas pendientes

Es posible que desee ver las tareas de análisis de todo el portaobjetos que no se hayan iniciado, pero que están en la cola.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para revisar las tareas pendientes

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Job Queue > Pending** y revise la cola de tareas.
- 2 Seleccione el botón **Refresh** para actualizar la lista.

Cancelación de tareas pendientes

Puede cancelar una tarea pendiente si hay una tarea de mayor prioridad. Las tareas canceladas se pueden reiniciar desde la pestaña **Cancelled / Completed**.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cancelar una tarea pendiente

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Job Queue > Pending** y seleccione la tarea que desea cancelar.
- 2 Seleccione el botón **Cancel Job**.

Revisión de tareas fallidas

Contenidos de esta sección

- Revisión y clasificación de las tareas fallidas (257)
- Cancelación de tareas fallidas (258)
- Reinicio de tareas fallidas (258)
- Revisión y clasificación de las tareas canceladas/completadas (259)
- Reinicio de tareas canceladas (259)

Revisión y clasificación de las tareas fallidas

Puede ver una lista de las tareas de análisis de todo el portaobjetos que han fallado, y reiniciar o cancelar las tareas fallidas.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para revisar y clasificar tareas fallidas

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Job Queue > Failed** y revise los Failed jobs.
- 2 Seleccione el botón **Refresh** para actualizar la lista.
- 3 Seleccione el nombre de una columna para clasificar la lista en orden ascendente o descendente. La columna se ordena cada vez que seleccione el encabezado de la columna. La flecha indica el orden de clasificación.
 - ❶ Puede clasificar utilizando las columnas **Job#**, **Job Owner**, **Case**, **Test Type** o **Last UpDated**. Las otras columnas no se pueden clasificar.

In-Progress	Pending	Failed	Cancelled / Completed	
Failed				
▲Job#	Job Owner	Case	Specimen	Slit

▼Job Owner

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

Cancelación de tareas fallidas

Puede cancelar una tarea de análisis de todo el portaobjetos fallido. Las tareas canceladas se pueden reiniciar desde la pestaña **Cancelled / Completed**.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cancelar una tarea pendiente

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Job Queue > Pending** y seleccione la tarea que desea cancelar.
- 2 Seleccione el botón **Cancel Job** para cancelar la tarea.

Reinicio de tareas fallidas

Puede reiniciar una tarea fallida.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para reiniciar una tarea fallida

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Job Queue > Failed** y seleccione la tarea que desea reiniciar.
- 2 Seleccione el botón **Start Job** para reiniciar la tarea.

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A.Q e.l.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Revisión y clasificación de las tareas canceladas/completadas

Puede revisar una lista de todas las tareas de análisis de todo el portaobjetos. Las tareas canceladas se pueden reiniciar.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para revisar y clasificar tareas canceladas/completadas

- 1 Seleccione la pestaña **Administrator Settings > Job Queue > Cancelled / Completed**.
- 2 Seleccione el botón **Refresh** para actualizar la lista.
- 3 Seleccione el nombre de una columna para clasificar la lista en orden ascendente o descendente. La columna se ordena cada vez que seleccione el encabezado de la columna. La flecha indica el orden de clasificación.
 - ❶ Puede clasificar utilizando las columnas **Job#**, **Job Owner**, **Case**, **Test Type**, **Last Updated** o **Status**.

Reinicio de tareas canceladas

Puede reiniciar una tarea cancelada si es necesario.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para reiniciar una tarea cancelada

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Job Queue > Cancelled / Completed** y seleccione la tarea que desea reiniciar.
- 2 Seleccione el botón **Start Job** para reiniciar la tarea.



Configuración de la tinción


Contenidos de esta sección

Acerca de la configuración de la tinción (260)

Configuración de la configuración de tinción (261)

Acerca de la configuración de la tinción

Desde la pantalla **Stain Setup**, puede añadir y editar los resultados y las declaraciones de descargo de responsabilidad de control estándar para los biomarcadores. Por lo tanto, estas declaraciones se pueden incluir en los informes del patólogo. Se pueden crear declaraciones personalizadas para cada laboratorio o cliente.

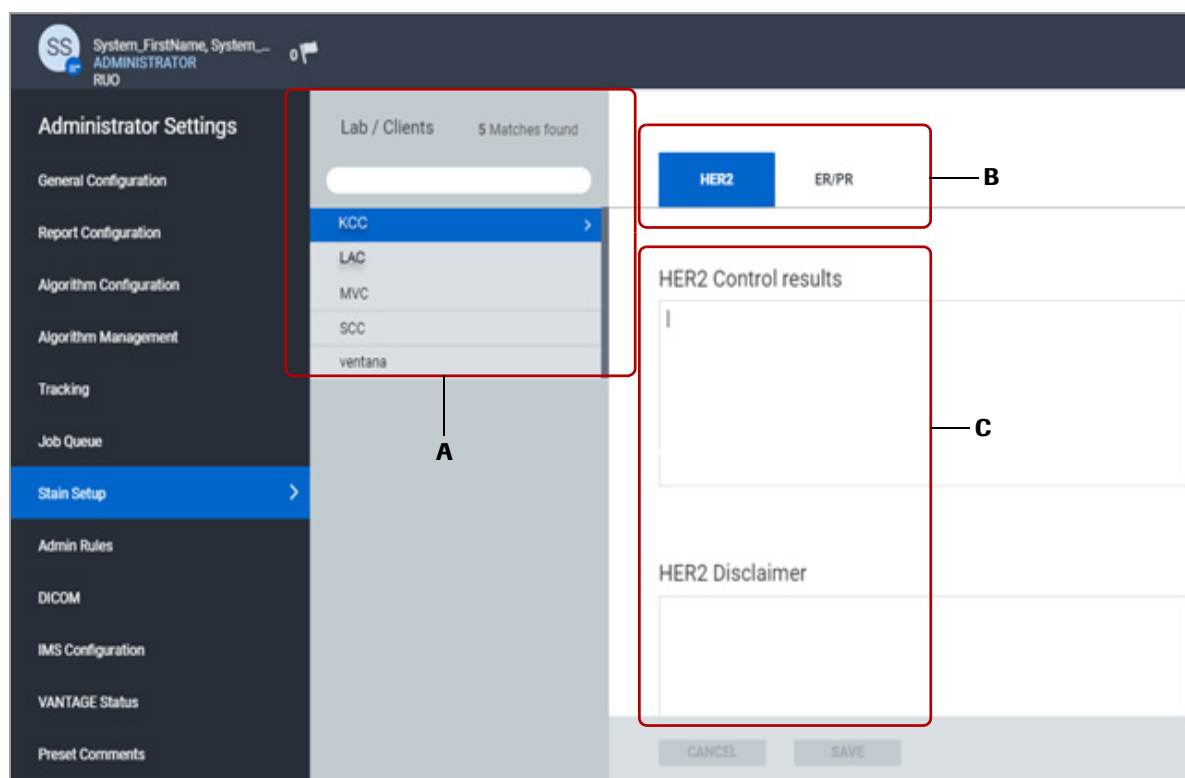

- A** Búsqueda de un centro o cliente o selección de un centro o cliente existente de la lista.
- B** Selección de un biomarcador para el control.
- C** Introducción de comentarios para los resultados de control y las declaraciones de control de los biomarcadores.

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 Division Diagnostico
 DT & APODERADA LEGAL

Configuración de la configuración de tinción

Contenidos de esta sección

Adición de resultados y declaraciones de descargo de responsabilidad de control de biomarcadores. (261)

Edición de los resultados y las declaraciones de descargo de responsabilidad de control de los biomarcadores (262)

Adición de resultados y declaraciones de descargo de responsabilidad de control de biomarcadores.

Se pueden añadir resultados y declaraciones de descargo de responsabilidad de control de los biomarcadores y, de forma específica, para cada laboratorio o cliente.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para añadir resultados y declaraciones de descargo de responsabilidad de control de biomarcadores

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Stain Setup > Lab / Clients** y, a continuación, seleccione el laboratorio o cliente.
- 2 Seleccione la pestaña de un biomarcador y, a continuación, introduzca una declaración en los cuadros de texto de los resultados y el descargo de responsabilidad de control de los biomarcadores.
- 3 Seleccione el botón **SAVE**.



Edición de los resultados y las declaraciones de descargo de responsabilidad de control de los biomarcadores

Puede editar los resultados y las declaraciones de descargo de responsabilidad de control de los biomarcadores que se hayan añadido para cada laboratorio o cliente.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para editar los resultados y las declaraciones de descargo de responsabilidad de control de los biomarcadores

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Stain Setup > Lab / Clients** y, a continuación, seleccione el laboratorio o cliente.
- 2 Seleccione la pestaña de un biomarcador y, a continuación, introduzca una declaración en los cuadros de texto de los resultados y el descargo de responsabilidad de control de los biomarcadores.
- 3 Seleccione el botón **SAVE**.

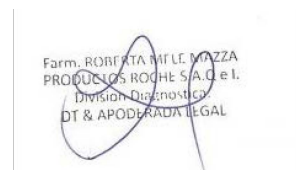

Configuración de las reglas de administración

Contenidos de esta sección

Acerca de la configuración de las reglas de análisis de la imagen (264)

Lista de tipos de tejido predeterminados, de biomarcador y de clon (264)

Gestión de tipos de tejido (265)

Creación y modificación de tipos de pruebas globales (274)

Creación y modificación de tipos de clones globales (277)


Gestión de proveedores globales (280)

Habilitación o deshabilitación del filtro entrante (283)

Acerca de la configuración de las reglas de análisis de la imagen

Un análisis de la imagen se basa en los tipos de tejido y el tipo de prueba y de puntuación del biomarcador asociado. Puede ver el tejido predefinido y los tipos de prueba y de clon del biomarcador que están instalados en uPath software para analizar las imágenes del portaobjetos.

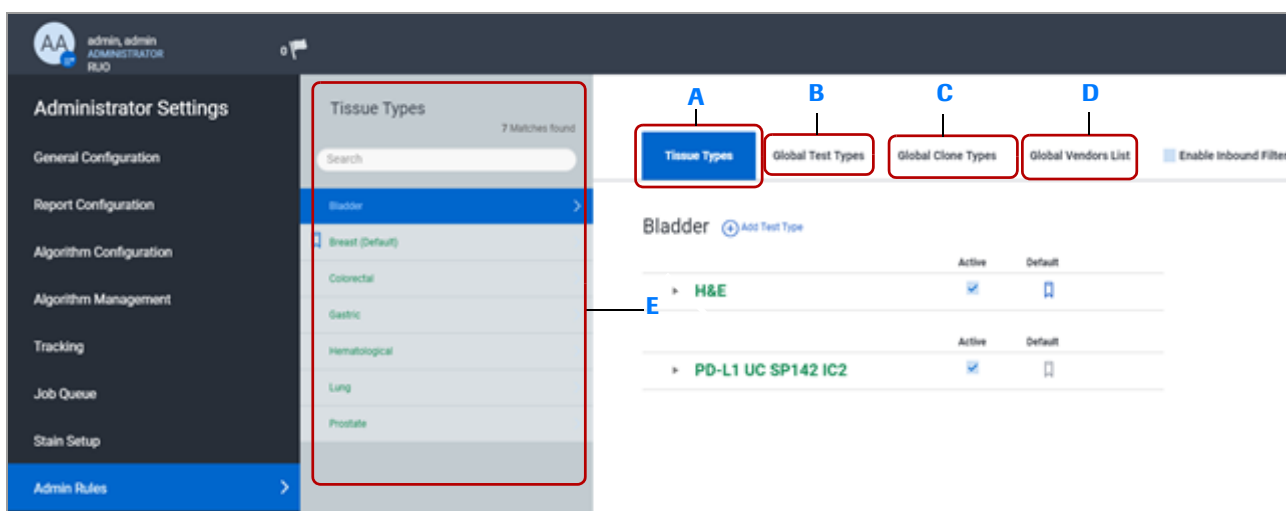

También puede crear un análisis nuevo y añadir los tipos de tejido, las pruebas del biomarcador, los tipos de puntuación, los clones del biomarcador y los portaobjetos de control. También puede configurar una lista de proveedores globales.



- A** Pestaña Tissue Types: Visualización de los tipos de tejido.
- B** Pestaña Global Test Types: Creación de nuevos tipos de pruebas del biomarcador o gestión de los tipos de pruebas del biomarcador existentes.
- C** Pestaña Global Clone Types: Creación de nuevos tipos de clon del biomarcador o gestión de los tipos de clon del biomarcador existentes.
- D** Pestaña Global Vendors List: visualización de una lista con los proveedores globales.
- E** Panel Tissue Types: Visualización de una lista de los tipos de tejido predeterminados o configurados.

Lista de tipos de tejido predeterminados, de biomarcador y de clon

Cuando uPath software está instalado, existen tipos predeterminados del tejido, la prueba y la puntuación del biomarcador y los portaobjetos de control y de clon del biomarcador. Los tipos predeterminados se utilizan en los algoritmos de análisis instalados en uPath software.

Tipo	Entradas
Tejido	<ul style="list-style-type: none"> • Bladder • Breast (establecer como predeterminado) • Colorectal • Gastric • Hematological • Lung • Prostate
Prueba	<ul style="list-style-type: none"> • ER: receptor de estrógenos • HER2: receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico • H&E: hematoxilina y eosina • Ki-67: antígeno identificado por anticuerpos monoclonales para Ki-67 • p53: antígeno identificado por anticuerpos monoclonales para p53 • RP: receptor de la progesterona
Puntuación	<ul style="list-style-type: none"> • None: ninguna puntuación • Free Text: puntuación manual
<p> Póngase en contacto con su representante de Roche para conocer los algoritmos que se encuentran disponibles en su región y acceder a ellos.</p>	
Clon	<ul style="list-style-type: none"> • 1E2: tipo de clon para RP • 30-9: tipo de clon para Ki-67 • 4B5: tipo de clon para HER2 • DO-7: tipo de clon para p53 • SP1: tipo de clon para ER
Control	<ul style="list-style-type: none"> • Negative • None • Positive
<p> Lista de tipos predeterminados utilizados en los algoritmos de análisis</p>	

Gestión de tipos de tejido

Contenidos de esta sección

Incorporación y eliminación de un tipo de tejido (266)

Cambio del nombre de un tipo de tejido (266)

Modificación de un tipo de tejido (267)

Configuración del tipo de tejido predeterminado (268)

Conversión de un tipo de tejido en elemento predeterminado (269)

Cambio del estado de activación de un tipo de tejido (270)

Eliminación de un tipo de tejido (271)

Asociación de un tipo de tejido a una prueba de biomarcador (272)

Incorporación y eliminación de un tipo de tejido

Puede añadir un tipo de tejido a uPath software. También es posible eliminar un tipo de tejido que haya creado el administrador en uPath software.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para añadir y eliminar un tipo de tejido

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules** y, a continuación, seleccione un centro o cliente y una plantilla.
- 2 En el panel **Tissue Types**, seleccione el botón **New**.
- 3 En el nuevo campo de entrada, especifique el nombre del tipo de tejido nuevo y pulse el botón Intro.
 - El nombre del nuevo tejido aparece en el panel Tissue Types.
- 4 Para eliminar un tipo de tejido, resalte el tipo de tejido, seleccione el botón **Delete** y confirme la opción cuando sea necesario.
 - Únicamente es posible eliminar los tipos de tejido que se han creado en el laboratorio de la lista de tipos de tejido de uPath software.
 - El nombre del tejido deja de aparecer en el panel Tissue Types.

Cambio del nombre de un tipo de tejido

Puede cambiar el nombre de los tipos de tejido.



Los tipos de tejido que forman parte de la instalación predeterminada de uPath software se muestran en una fuente de color verde y no es posible cambiar su nombre.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cambiar el nombre de un tipo de tejido

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules > Tissue Types**.
- 2 Seleccione el tejido y, a continuación, seleccione el botón **Rename**.
- 3 Edite el nombre del tejido y, a continuación, pulse la tecla Intro para cambiarlo en la lista.

► **Temas relacionados**

- Configuración del formato de ID de portaobjetos (208)
- Cambio del estado de activación de un tipo de tejido (270)
- Conversión de un tipo de tejido en elemento predeterminado (269)
- Eliminación de un tipo de tejido (271)
- Adición de un tipo de prueba global (274)

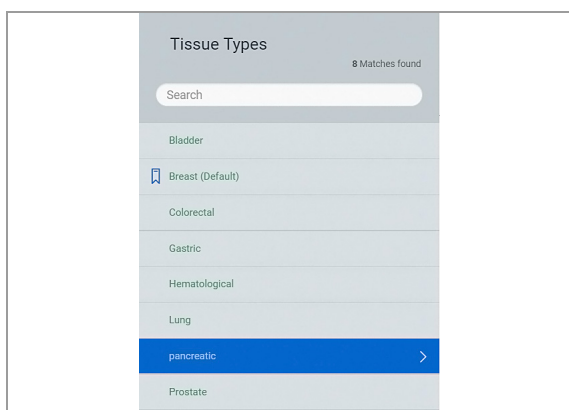

Modificación de un tipo de tejido

Puede modificar el tipo de tejido y el tipo de prueba, el tipo de puntuación, el tipo de clon y el tipo de control asociados.





Los tipos de tejido que forman parte de la instalación predeterminada de uPath software se muestran en una fuente de color verde y no es posible cambiar su nombre.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

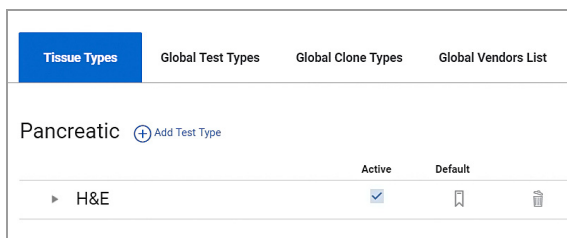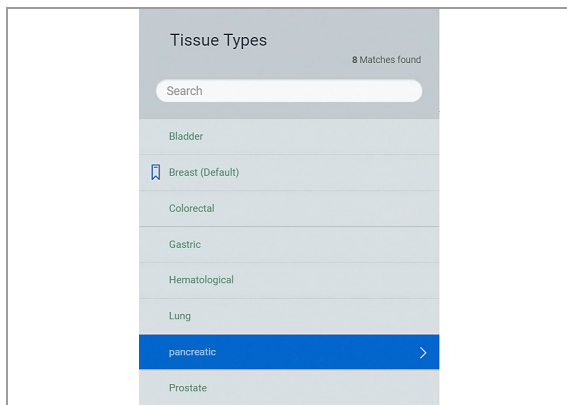

► Para modificar un tipo de tejido

1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules > Tissue Types**.

2 Seleccione el tejido y realice cualquiera de las operaciones siguientes:

- Desmarque la casilla de verificación **Active** situada al lado de una prueba para desactivar la prueba para el tejido.
- Seleccione el botón  para eliminar una prueba del tipo de tejido. En el mensaje de notificación, confirme la eliminación seleccionando el botón **Yes**.
- Seleccione el botón **Add Test Type** y, a continuación, seleccione una prueba de biomarcador de la lista desplegable. Seleccione el botón **DONE**.

📖 Temas relacionados

- Configuración del formato de ID de portaobjetos (208)
- Cambio del estado de activación de un tipo de tejido (270)
- Conversión de un tipo de tejido en elemento predeterminado (269)
- Eliminación de un tipo de tejido (271)
- Adición de un tipo de prueba global (274)

Configuración del tipo de tejido predeterminado



Puede establecer un tipo de tejido predeterminado en la lista de tipos de tejido. El tipo de tejido predeterminado del sistema es Breast.

Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para configurar el tipo de tejido predeterminado

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules**.
 - ❶ En el panel Tissue Types, el tipo de tejido predeterminado está marcado con un icono de marcador antes del tipo de tejido y el texto «(Default)» detrás.
- 2 Para modificar la selección del tipo de tejido predeterminado, resalte el tipo de tejido que quiere establecer como predeterminado y seleccione el botón Default.

Conversión de un tipo de tejido en elemento predeterminado

Puede establecer el estado de un tipo de tejido de activado a desactivado.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para convertir un tipo de tejido en elemento predeterminado

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules > Tissue Types**.
- 2 Seleccione Tissue Type y, a continuación, seleccione el botón **Default**.
 - El icono de marcador predeterminado y la palabra «(Default)» se muestran con el nombre del tipo de tejido.


» **Temas relacionados**

- Configuración del formato de ID de portaobjetos (208)
- Modificación de un tipo de tejido (267)
- Cambio del estado de activación de un tipo de tejido (270)
- Eliminación de un tipo de tejido (271)
- Adición de un tipo de prueba global (274)

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROUHE S.A. de I.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Cambio del estado de activación de un tipo de tejido

Puede establecer el estado de un tipo de tejido y el estado de activación de la prueba asociada.


 Los tipos de tejidos desactivados aparecen atenuados en la lista de tipos de tejido.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.


► Para cambiar el estado de activación de un tipo de tejido

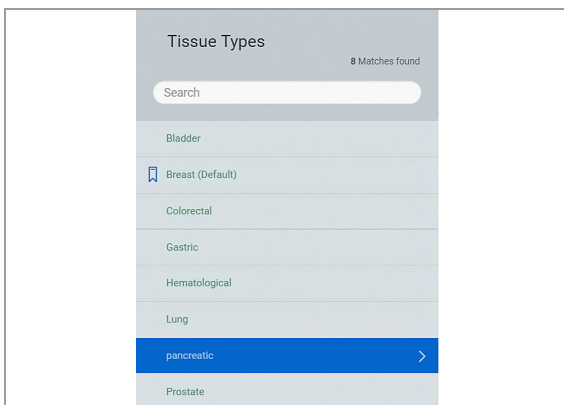

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules > Tissue Type**.
- 2 Seleccione el tejido y, a continuación, seleccione el botón **Deactivate**. El nombre del tejido se vuelve de color gris en la lista.
 - El botón **Deactivate** cambia a un botón **Reactivate**.
- 3 Seleccione el tejido y, a continuación, seleccione el botón **Reactivate**. El nombre del tejido deja de ser de color gris en la lista.
 - El botón **Reactivate** cambia a un botón **Deactivate**.


📖 Temas relacionados

- Configuración del formato de ID de portaobjetos (208)
- Modificación de un tipo de tejido (267)
- Conversión de un tipo de tejido en elemento predeterminado (269)
- Eliminación de un tipo de tejido (271)
- Adición de un tipo de prueba global (274)

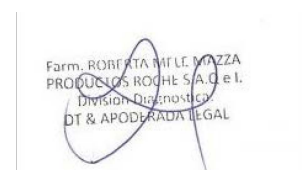

Eliminación de un tipo de tejido

Si no necesita acceder a un tipo de tejido que haya creado un administrador, puede eliminarlo.

 Los tipos de tejido que forman parte de la instalación predeterminada de uPath software se muestran en una fuente de color verde y no es posible eliminarlos. Sin embargo, si no son necesarios, se pueden desactivar.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.



- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para eliminar un tipo de tejido

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules > Tissue Type**.
- 2 Seleccione el tipo de tejido y, a continuación, seleccione el botón **Delete** para eliminarlo de la lista. En la notificación, confirme la eliminación seleccionando el botón **Yes**.
 - ❗ Una vez que se elimine el Tissue Type, **NO SE PUEDE** recuperar. Si se elimina, tendrá que volver a crearlo si es necesario.

📖 Temas relacionados

- Configuración del formato de ID de portaobjetos (208)
- Modificación de un tipo de tejido (267)
- Cambio del estado de activación de un tipo de tejido (270)
- Conversión de un tipo de tejido en elemento predeterminado (269)
- Adición de un tipo de prueba global (274)

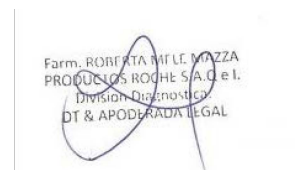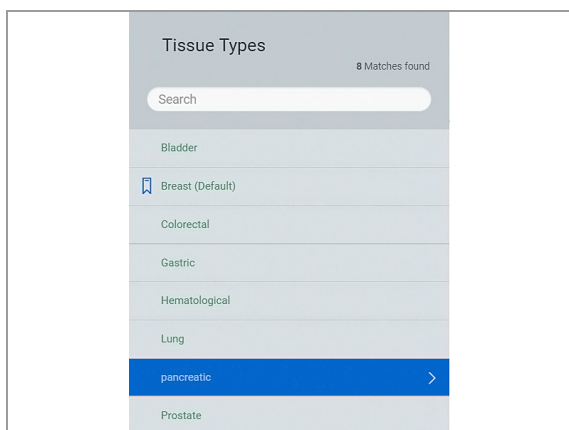

Asociación de un tipo de tejido a una prueba de biomarcador

Puede asociar un método de prueba y de puntuación del biomarcador, un clon del biomarcador y unos portabjetos de control con un tipo de tejido nuevo.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.
- Verifique que la prueba del biomarcador que desea asociar con el tipo de tejido nuevo está creada en la pestaña **Global Test Types**.


► Para añadir un nuevo tipo de tejido




- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules**.
- 2 Seleccione el botón **New** y, en el campo nuevo situado en la parte inferior de la lista, introduzca el nombre del tejido y pulse la tecla Intro para añadirlo a la lista.

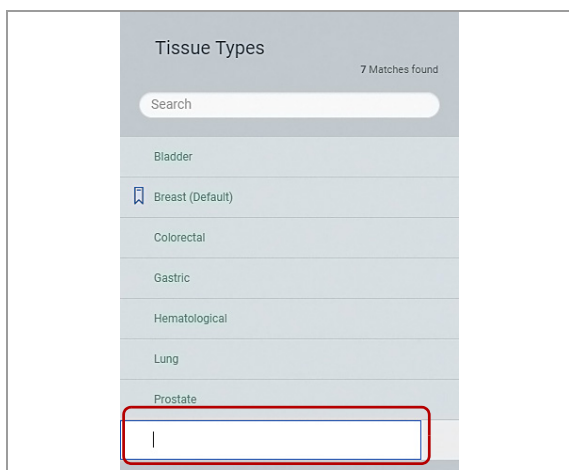

► Para asociar un tipo de tejido a una prueba de biomarcador

- 1 Seleccione el tipo de tejido nuevo y, a continuación, seleccione el botón **Add Test Type**.
 - Seleccione la prueba del biomarcador de la lista desplegable y, a continuación, seleccione el botón **DONE**.
 - Si son necesarios tipos de pruebas de biomarcador adicionales, seleccione de nuevo el botón **Add Test Type**.

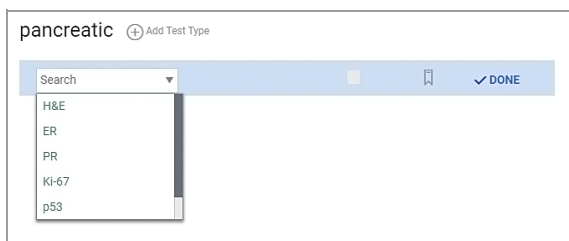

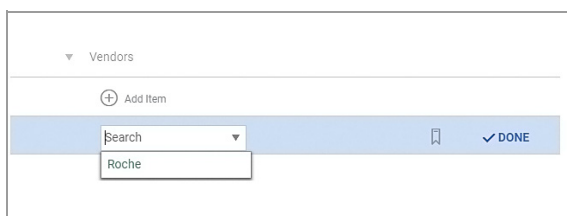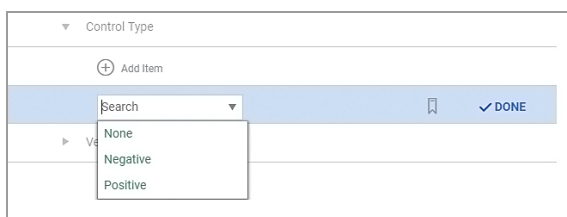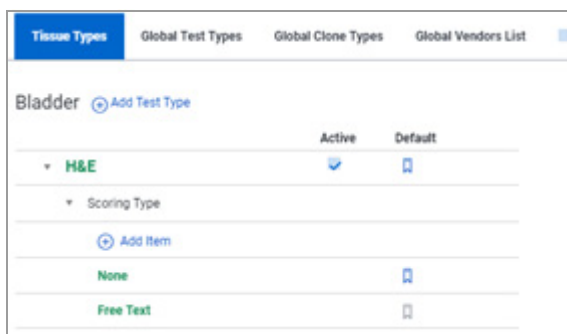

2 Para añadir un tipo de puntuación, amplíe **Scoring Type** y, a continuación, seleccione el botón **Add Item**.

- Seleccione un tipo de puntuación de la lista desplegable y, a continuación, seleccione el botón **DONE**.
- Si son necesarios tipos de puntuación adicionales, seleccione de nuevo el botón **Add Item**.


3 Para añadir portaobjetos de control, amplíe **Control Type** y seleccione el botón **Add Item**.

- Seleccione un tipo de control de la lista desplegable y, a continuación, seleccione el botón **DONE**.
- Si es necesario añadir tipos de control adicionales, seleccione de nuevo el botón **Add Item**.

4 Para añadir un proveedor, amplíe **Vendors** y seleccione el botón **Add Item**.

- Seleccione un proveedor de la lista desplegable y, a continuación, seleccione el botón **DONE**.

5 Para establecer el tipo de puntuación, el tipo de clon, el tipo de control o el proveedor como un elemento predeterminado, haga lo siguiente.

- Amplíe el tipo de prueba y, a continuación, amplíe **Scoring Type**, **Clone Type**, **Control Type** o **Vendors**.
- En la fila situada al lado del elemento que desee convertir en predeterminado, seleccione el botón . Repita esto para cualquier otro elemento que desee convertir en predeterminado.

→ El icono de marcador predeterminado en la fila del elemento se vuelve de color azul.

Temas relacionados

- Modificación de un tipo de tejido (267)
- Cambio del estado de activación de un tipo de tejido (270)
- Conversión de un tipo de tejido en elemento predeterminado (269)
- Eliminación de un tipo de tejido (271)
- Adición de un tipo de prueba global (274)

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. Q. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Creación y modificación de tipos de pruebas globales

Contenidos de esta sección

- Adición de un tipo de prueba global (274)
- Edición de un tipo de prueba global (274)
- Cambio del estado de activación de un tipo de prueba global (275)
- Eliminación de un tipo de prueba global (276)

Adición de un tipo de prueba global

Puede añadir nuevos tipos de pruebas o gestionar los tipos de pruebas existentes que se pueden asociar con los tipos de tejido.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para añadir un tipo de prueba global

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules > Global Test Types**.
- 2 Seleccione el botón **Add** y, en el campo nuevo situado en la parte inferior de la lista, introduzca el nombre de la prueba del biomarcador.
- 3 Seleccione el botón **DONE**.



• Temas relacionados

- Edición de un tipo de prueba global (274)
- Cambio del estado de activación de un tipo de prueba global (275)
- Eliminación de un tipo de prueba global (276)

Edición de un tipo de prueba global

Puede editar un tipo de prueba global. Cuando añada el tipo de prueba, tendrá que cambiarle el nombre.


Los tipos de prueba que forman parte de la instalación predeterminada de uPath software se muestran en una fuente de color verde y no es posible modificarlos.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cambiar el nombre de un tipo de prueba global

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules > Global Test Types**.
- 2 Seleccione el botón  situado al lado del tipo de tejido que desea editar.
- 3 En el campo test type, edite el nombre del tipo de prueba y, a continuación, pulse la tecla Intro para actualizar el tipo de prueba en la lista.



► **Temas relacionados**

- Adición de un tipo de prueba global (274)
- Cambio del estado de activación de un tipo de prueba global (275)
- Eliminación de un tipo de prueba global (276)

Cambio del estado de activación de un tipo de prueba global

Puede activar o desactivar cualquier tipo de prueba global.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cambiar el estado de activación de un tipo de prueba global

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules > Global Test Types**.
- 2 Seleccione el tipo de prueba y, a continuación, haga lo siguiente:
 - Desmarque la casilla de verificación **Active** para desactivar el tipo de prueba.
 - Seleccione la casilla de verificación **Active** para activar el tipo de prueba.



Temas relacionados

- Adición de un tipo de prueba global (274)
- Edición de un tipo de prueba global (274)
- Eliminación de un tipo de prueba global (276)

Eliminación de un tipo de prueba global

Puede eliminar un tipo de prueba global si deja de ser necesario.


Los tipos de prueba que forman parte de la instalación predeterminada de uPath software se muestran en una fuente de color verde y no es posible eliminarlos.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

Para eliminar un tipo de prueba global

- Selecione **Administrator Settings > Admin Rules > Global Test Types**.
- Selecione el botón  situado al lado del tipo de prueba que desea eliminar de la lista. En la notificación, confirme la eliminación seleccionando el botón **Yes**.
 - Una vez que se elimine el tipo de prueba, **NO SE PUEDE** recuperar. Si se elimina, tendrá que volver a crearlo si es necesario.

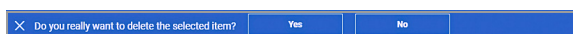

Temas relacionados

- Adición de un tipo de prueba global (274)
- Edición de un tipo de prueba global (274)
- Cambio del estado de activación de un tipo de prueba global (275)

Creación y modificación de tipos de clones globales

Contenidos de esta sección

- Adición de un tipo de clon global (277)
- Edición de un tipo de clon global (277)
- Cambio del estado de activación de un tipo de clon global (278)
- Eliminación de un tipo de clon global (279)

Adición de un tipo de clon global

Puede añadir un tipo de clon global y asociarlo con un tipo de tejido.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para añadir un tipo de clon global

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules > Global Clone Types**.
- 2 Seleccione el botón **Add** y, en el campo nuevo situado en la parte inferior de la lista, introduzca el nombre del clon.
- 3 Seleccione el botón **DONE**.



📖 Temas relacionados

- Edición de un tipo de clon global (277)
- Cambio del estado de activación de un tipo de clon global (278)
- Eliminación de un tipo de clon global (279)

Edición de un tipo de clon global

Puede editar y cambiar el nombre de un tipo de clon global.


💡 Los tipos de clon que forman parte de la instalación predeterminada de uPath software se muestran en una fuente de color verde y no es posible modificarlos.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cambiar el nombre de un tipo de clon global

- 1 Seleccione [Administrator Settings > Admin Rules > Global Clone Types](#).
- 2 Seleccione el botón  situado al lado del tipo de clon que desea editar.
- 3 Edite el nombre del tipo de clon y pulse la tecla Intro para cambiar el nombre en la lista.



► Temas relacionados

- Adición de un tipo de clon global (277)
- Cambio del estado de activación de un tipo de clon global (278)
- Eliminación de un tipo de clon global (279)

Cambio del estado de activación de un tipo de clon global

Puede activar o desactivar cualquier tipo de clon global.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cambiar el estado de activación de un tipo de clon global

- 1 Seleccione [Administrator Settings > Admin Rules > Global Clone Types](#).
- 2 Seleccione el tipo de clon y, a continuación, haga lo siguiente:
 - Desmarque la casilla de verificación **Active** para que el nombre del clon adopte un color gris y se vuelva inactivo.
 - Seleccione la casilla de verificación **Active** para que el nombre del clon se vuelva visible y activo.




Temas relacionados

- Adición de un tipo de clon global (277)
- Edición de un tipo de clon global (277)
- Eliminación de un tipo de clon global (279)

Eliminación de un tipo de clon global

Puede eliminar tipos de clones globales si dejan de ser necesarios.


 Los tipos de clon que forman parte de la instalación predeterminada de uPath software se muestran en una fuente de color verde y no es posible eliminarlos.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

Para eliminar un tipo de clon global

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules > Global Clone Types**.
- 2 Seleccione el botón  situado al lado del tipo de clon que desea eliminar de la lista. En la notificación, confirme la eliminación seleccionando el botón **Yes**.
 - ❗ Una vez que se elimine el tipo de clon, NO SE PUEDE recuperar. Si se elimina, tendrá que volver a crearlo si es necesario.



Temas relacionados

- Adición de un tipo de clon global (277)
- Edición de un tipo de clon global (277)
- Cambio del estado de activación de un tipo de clon global (278)

Farm. ROBERTA NITTE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

Gestión de proveedores globales

Contenidos de esta sección

- Adición de un proveedor global (280)
- Edición de un proveedor global (280)
- Cambio del estado de activación de un proveedor global (281)
- Eliminación de un proveedor global (282)

Adición de un proveedor global

Puede añadir un proveedor global. El fabricante del software figura en fuente de color verde.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para añadir un proveedor global

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules > Global Vendors List**.
- 2 Seleccione el botón **Add** y, en el campo nuevo situado en la parte inferior de la lista, introduzca el nombre del proveedor.
- 3 Seleccione el botón **DONE**.


📖 Temas relacionados

- Edición de un proveedor global (280)
- Cambio del estado de activación de un proveedor global (281)
- Eliminación de un proveedor global (282)



Edición de un proveedor global

Puede editar y cambiar el nombre de un proveedor global.

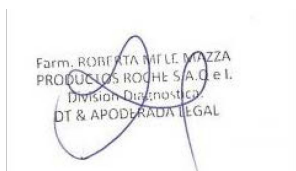


💡 El proveedor, Roche, forma parte de la instalación predeterminada de uPath software. Se muestra en una fuente de color verde y no se puede editar.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cambiar el nombre de un proveedor global

- 1 Seleccione [Administrator Settings > Admin Rules > Global Vendors List](#).
- 2 Seleccione el botón  situado al lado del nombre del proveedor global que desea editar.
- 3 Edite el nombre del proveedor y, a continuación, pulse la tecla Intro para cambiarlo en la lista.



► **Temas relacionados**

- Adición de un proveedor global (280)
- Cambio del estado de activación de un proveedor global (281)
- Eliminación de un proveedor global (282)

Cambio del estado de activación de un proveedor global

Puede activar o desactivar cualquier proveedor global.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cambiar el estado de activación de un proveedor global

- 1 Seleccione [Administrator Settings > Admin Rules > Global Vendors List](#).
- 2 Seleccione el proveedor global y, a continuación, haga lo siguiente:
 - Desmarque la casilla de verificación **Active** para que el nombre del proveedor global adopte un color gris y se vuelva inactivo.
 - Seleccione la casilla de verificación **Active** para que el nombre del proveedor global se vuelva visible y activo.




Temas relacionados

- Adición de un proveedor global (280)
- Edición de un proveedor global (280)
- Eliminación de un proveedor global (282)

Eliminación de un proveedor global

Puede eliminar un proveedor si deja de ser necesario que se muestre en la lista de proveedores.


 El fabricante forma parte de la instalación predeterminada de uPath software. Se muestra en una fuente de color verde y no se puede eliminar.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

Para eliminar un proveedor global

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Admin Rules > Global Vendors List**.
- 2 Seleccione el botón  situado al lado del proveedor global que desea eliminar de la lista. En la notificación, confirme la eliminación seleccionando el botón **Yes**.
 - ❶ Una vez que se elimine el proveedor global, NO SE PUEDE recuperar. Si se elimina, tendrá que volver a crearlo si es necesario.



Temas relacionados

- Adición de un proveedor global (280)
- Edición de un proveedor global (280)
- Cambio del estado de activación de un proveedor global (281)

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

Habilitación o deshabilitación del filtro entrante

Puede seleccionar entre aceptar o rechazar los tipos de tejido enviados por un LIS.

Los casos y los portaobjetos procedentes del LIS se pueden filtrar y rechazar si tienen tipos de tejido y/o pruebas que no existen o están inactivos en uPath software. Si el filtro entrante no está habilitado, los tipos de tejido y pruebas se añaden automáticamente a uPath software.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para habilitar el filtro entrante

- 1 Seleccione [Administrator Settings > Admin Rules](#).
- 2 Seleccione la casilla de verificación [Enable Inbound Filter](#).

 Enable Inbound Filter

► Para deshabilitar el filtro entrante

- 1 Seleccione [Administrator Settings > Admin Rules](#).
- 2 Desmarque la casilla de verificación [Enable Inbound Filter](#).

 Enable Inbound Filter

Configuración de comentarios predefinidos

Contenidos de esta sección

Acerca de la configuración de comentarios predefinidos (284)

Configuración de comentarios predefinidos (285)

Acerca de la configuración de comentarios predefinidos

Puede crear cuatro tipos de comentarios predefinidos que el patólogo puede añadir a los informes:

- [Case Notes](#)
- [Slide Notes](#)
- [Annotation Comments](#)
- [Gross Description](#)

The screenshot shows the 'Administrator Settings' interface. On the left is a sidebar with various configuration categories. The main area is titled 'Preset Comments' and contains four rows, each representing a type of comment. Each row has a red box around the 'Add' and 'Import' buttons, with a letter (A, B, C, or D) pointing to it. The status of each comment type is shown as 'Active'.

Comment Type	Buttons	Label	Status
Case Notes	Add Import	A	Active
Slide Notes	Add Import	B	Active
Annotation Comments	Add Import	C	Active
Gross Description	Add Import	D	Active

- A** Adición o importación de notas del caso.
- B** Adición o importación de notas del portaobjetos.
- C** Adición o importación de comentarios de anotación.
- D** Adición o importación de descripción general.

Farm. ROBERTA MFLI. MOZZA
 PRODUTOS ROCHE S.A. de I.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Configuración de comentarios predefinidos

Contenidos de esta sección

Incorporación de comentarios predefinidos (285)

Edición de comentarios predefinidos (285)

Importación de comentarios predefinidos (286)

Cambio del estado de activación de un comentario predefinido (287)

Eliminación de comentarios predefinidos (287)

Incorporación de comentarios predefinidos

Puede predefinir los comentarios que el patólogo puede añadir a un informe.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para añadir un comentario predefinido

1 Seleccione **Administrator Settings > Preset Comments**.

2 Seleccione el botón Add situado al lado del comentario que desea crear: **Case Notes**, **Slide Notes**, **Annotation Comments** o **Gross Description**.

3 En el campo de notas en blanco, introduzca la nota y, a continuación, pulse la tecla Intro para guardarla.


Edición de comentarios predefinidos

Puede editar los comentarios predefinidos existentes.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

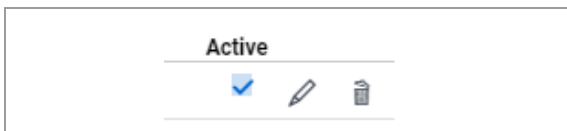

► Para editar un comentario predefinido

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Preset Comments**.
- 2 A la derecha del campo **Preset Comments** que desee editar, seleccione el botón  .
- 3 En el campo comment, edite la nota y, a continuación, pulse la tecla Intro.

Importación de comentarios predefinidos



Puede importar comentarios predefinidos desde un archivo .csv.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para importar un comentario predefinido

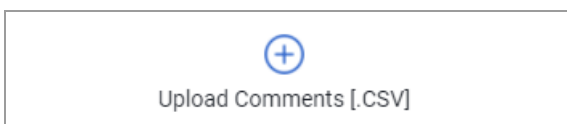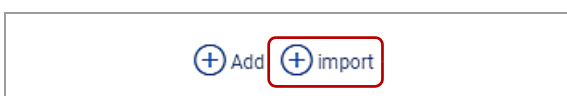

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Preset Comments**.
- 2 Seleccione el botón **Import** situado al lado del tipo de comentario que desea añadir: **Case Notes**, **Slide Notes**, **Annotation Comments** o **Gross Description**.
→ Se muestra el cuadro de diálogo **Upload Preset Comments**.
- 3 Seleccione el icono **Upload Comments [.CSV]**.
- 4 Desde el cuadro de diálogo **Open**, desplácese hasta el archivo .csv que desea utilizar y, a continuación, seleccione el botón **Open** y previsualice la imagen.
- 5 Seleccione el botón **Upload**.

Farm. ROBERTA MITLE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Cambio del estado de activación de un comentario predefinido

Puede desactivar o volver a activar los comentarios predefinidos.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para cambiar el estado de activación de un comentario predefinido

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Preset Comments**.
- 2 Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Active** para cambiar el estado de activación del comentario.
- 3 Para volver a activar un comentario inactivo, seleccione de nuevo la casilla de verificación **Active**.

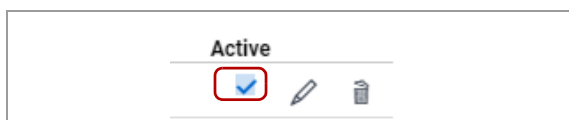

Eliminación de comentarios predefinidos


Puede eliminar los comentarios predefinidos.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para eliminar un comentario predefinido

- 1 Seleccione **Administrator Settings > Preset Comments**.
- 2 Seleccione el botón  situado al lado del tipo de comentario que desea eliminar.
- 3 Confirme la eliminación seleccionando el botón **Yes** en la notificación de banner.
 - El comentario deja de aparecer.



Mostrar información de la licencia

Es posible consultar la información sobre la licencia de uPath enterprise software, los algoritmos, el IMS (sistema de gestión de imágenes) y los asientos simultáneos.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Cómo mostrar información de la licencia

1 Seleccione **Administrator Settings > License Details**.

2 Desplácese para ver información para cada tipo de licencia.

- **uPath:** Facilita la información básica sobre la licencia de uPath software, entre otros, la clave de la licencia, el identificador del software, el estado, la fecha de activación, la fecha de caducidad y la duración de la licencia.
- **Image Storage:** Facilita la clave de la licencia de uPath software para el almacenamiento, el estado, la capacidad de almacenamiento, la fecha de activación, la fecha de caducidad y la duración de la licencia.
- **Concurrent Seat:** Facilita la clave de licencias simultáneas de uPath software, el estado, la cantidad de asientos simultáneos, la cantidad de usuario por asiento con licencia, la fecha de activación, la fecha de caducidad y la duración de la licencia.
- **Algorithm Usage:** Enumera todos los algoritmos con licencia con su ID de algoritmo, estado normativo, fecha efectiva, tipo (por análisis o por día), usos restantes en la licencia, recuento de la licencia y el umbral inferior de advertencia que informa sobre la proximidad al agotamiento del algoritmo con licencia. Además, facilita la opción de añadir información de contacto externa para el aviso por correo electrónico sobre el nivel bajo de usos restantes del algoritmo.

Gestión de datos

6	Gestión de datos para los administradores y los histotécnicos.....	291
---	--	-----

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
PRODUCILOS ROCHE S.A. e I.
Divisione Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Gestión de datos para los administradores y los histotécnicos

Contenidos del capítulo

6

Resumen de la gestión de datos	293
Acerca de las responsabilidades de la gestión de datos compartidas	294
Acerca de la gestión de datos para los administradores	294
Acerca de la gestión de datos para los histotécnicos	295
Acerca del panel Data Management.....	298
Tareas de gestión de datos compartidas para los casos	300
Creación y modificación de los casos	300
Acerca de los casos	300
Acerca de la gestión de casos pendientes ...	301
Creación de un caso nuevo	302
Modificación de un caso	310
Eliminación de un caso	311
Creación y modificación de entradas del paciente	312
Creación y modificación de entradas del médico	314
Búsqueda de una entrada en la gestión de datos	316
Eliminación de un paciente o un médico	317
Tareas del administrador en la gestión de datos	319
Creación y modificación de clientes	319
Creación y modificación de centros	320
Eliminación de un cliente o un centro	321
Gestión de las cuentas de usuario	322
Creación de una nueva cuenta de usuario ...	322
Desactivación de cuentas de usuario	324
Eliminación de cuentas de usuario	325
Creación y modificación de funciones de usuario	326
Acerca de funciones y permisos de usuario ..	327
Creación de una nueva función de usuario ..	328
Cambio del nombre de una función de usuario	329
Modificación de una función de usuario	330
Eliminación de una función de usuario	332
Tareas del histotécnico en la gestión de datos	334
Acerca de las solicitudes de portaobjetos	334

Adición de portaobjetos o de un patólogo a un caso	334
Visualización de solicitudes de portaobjetos	336
Eliminación de solicitudes de portaobjetos	337
Realización de solicitudes de portaobjetos	338



Farm. ROBERTA MILLE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A.C e.l.
Division Diagnostico
DT & APODERADO LEGAL

Resumen de la gestión de datos

Contenidos de esta sección

Acerca de las responsabilidades de la gestión de datos compartidas (294)

Acerca de la gestión de datos para los administradores (294)

Acerca de la gestión de datos para los histotécnicos (295)

Acerca del panel Data Management (298)

Acerca de las responsabilidades de la gestión de datos compartidas

El administrador y el histotécnico pueden compartir responsabilidades de la gestión de datos, mientras que otras responsabilidades son exclusivas para cada función.

La tabla que aparece a continuación muestra las responsabilidades compartidas y exclusivas de las funciones del administrador y el histotécnico.

Capacidades	Administrador	Histotécnico
Gestión de los datos de los casos	Sí	Sí
Gestión de los datos de los pacientes	Sí	Sí
Gestión de los datos de los médicos	Sí	Sí
Gestión de las solicitudes de los portaobjetos	No aplicable	Sí
Gestión de la configuración de los clientes	Sí	No aplicable
Gestión de la configuración de los centros	Sí	No aplicable
Gestión de las cuentas de usuario	Sí	No aplicable
Gestión de las funciones y los permisos	Sí	No aplicable
Visualización de la lista de los casos	No	Sí

☒ Capacidades de la gestión de datos compartidas

Acerca de la gestión de datos para los administradores

Los administradores pueden acceder a la pantalla **Data Management** para llevar cabo las tareas siguientes:


- Visualizar, crear y modificar todos los casos
- Visualizar, crear y modificar todos los médicos y pacientes
- Crear, visualizar y modificar todos los clientes y centros
- Crear, visualizar y modificar las cuentas de los usuarios, asignar las contraseñas y desbloquear las cuentas
- Crear, visualizar y asignar las funciones y los permisos de los usuarios

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCI. LOS ROCHE S.A. d.e.l.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

Pantallas de gestión de datos adicionales

La pantalla **Data Management** es la principal pantalla utilizada para las funciones del administrador.

La función predeterminada del administrador no tiene acceso a las pantallas **CASES**, **VIEWER** o **REPORT** en uPath software.

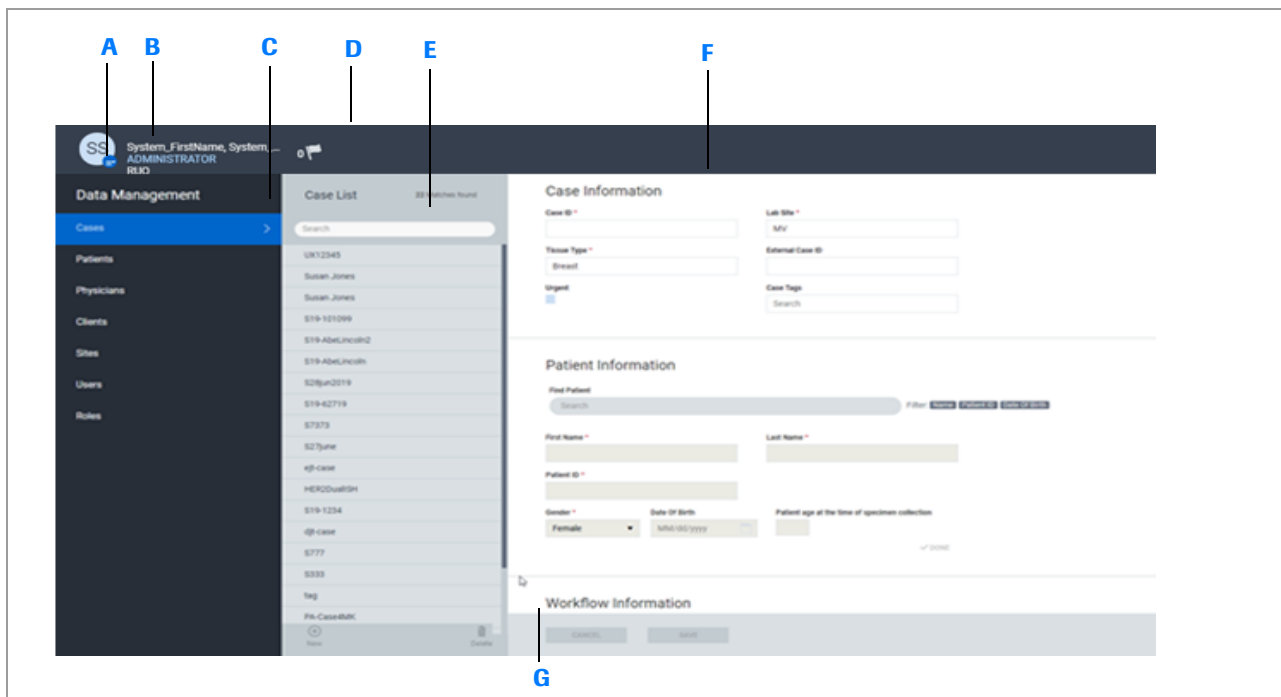

- A** La barra de menú Quick Action muestra el botón **User Settings**, el indicador de notificaciones y los botones para la gestión de los casos.
- B** Selección del botón **User Settings** para visualizar las opciones de **Administrator Settings**, **Data Management**, **User Preferences**, **Help & Support**, **About software version** o **Logout**.
- C** Selección de las opciones **Data Management** para Cases, Patients, Physicians, Clients, Sites, Users y Roles.
- D** Visualización de las notificaciones para nuevos casos o de las acciones para los casos existentes.
- E** Visualización de las listas de casos, pacientes, médicos, clientes, centros, usuarios o funciones.
- F** Creación, modificación y visualización de las entradas (se muestra el formulario Case Information).
- G** Creación y modificación de las entradas con los botones **New**, **Delete**, **CANCEL** y **SAVE**.

Acerca de la gestión de datos para los histotécnicos

Los histotécnicos pueden acceder a la pantalla **Data Management** para llevar cabo las tareas siguientes:

- Crear, visualizar y modificar todos los casos
- Visualizar la lista de tareas de soporte (solicitudes de portaobjetos del patólogo)
- Crear, visualizar y modificar todos los médicos y pacientes

Pantallas de gestión de datos adicionales

La pantalla **Data Management** es la principal pantalla utilizada para las funciones del histotécnico.

También puede ver información adicional en las pantallas **CASES** y **VIEWER** utilizadas por el patólogo.


Desde la pantalla **CASES**, puede:

- Ver los casos activos, cancelados o cerrados.
- Ver y ordenar los casos activos según el ID del caso, el patólogo asignado o su estado.


Desde la pantalla **VIEWER**, puede:

- Ver los portaobjetos asignados a un caso.
- Añadir la información de configuración de la tinción cuando sea necesario.

Puede utilizar la pantalla **Data Management** para gestionar las entradas de los casos, los pacientes, los médicos y las solicitudes de portaobjetos.

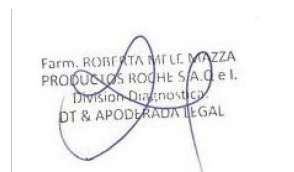

Farm. ROBERTA INFANTE MOZZA
PRODUCCIONES ROCHE S.A.C. e.I.
División Diagnóstico
DT & APODERADA LEGAL

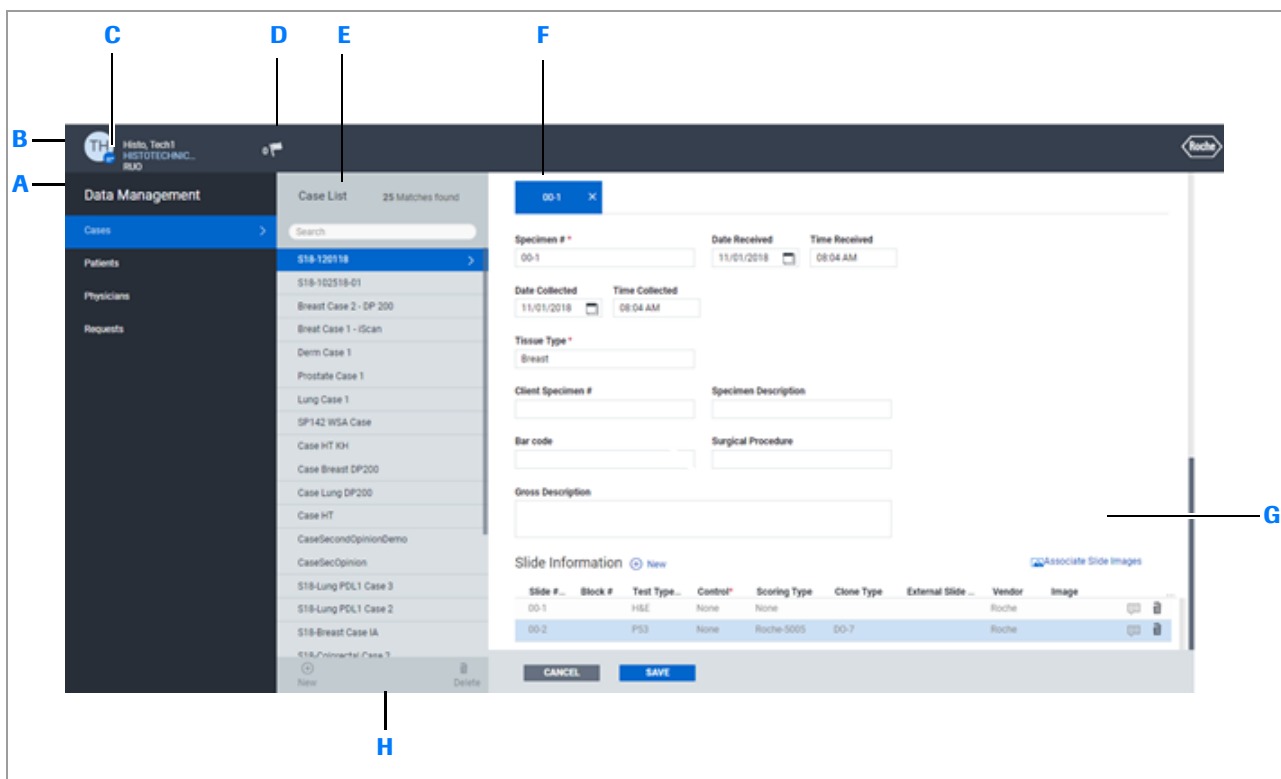

- A** Selección de las opciones **Data Management** para Cases, Patients, Physicians o Requests.
- B** La barra de menú Quick Action muestra el botón **User Settings**, el indicador de notificaciones y los botones para la gestión de los casos.
- C** Selección del botón **User Settings** para visualizar las opciones de **uPath**, **Data Management**, **User Preferences**, **Help & Support**, **About** versión del software o **Logout**.
- D** Visualización de las notificaciones para nuevos casos o de las acciones para los casos existentes.
- E** Visualización de las listas de casos, pacientes, médicos o solicitudes de portaobjetos.
- F** Visualización y edición de los casos, los pacientes, los médicos o las solicitudes de portaobjetos (se muestra el formulario Case Information).
- G** Visualización de las entradas del caso, el paciente, el médico o la solicitud seleccionada (ejemplo que muestra el formulario Case Information).
- H** Creación y modificación de las entradas con los botones **New**, **Delete**, **CANCEL** y **SAVE**.

Temas relacionados


- Configuración de las preferencias del usuario (42)

Farm. ROBERTA HELE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. Q e I.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

Acerca del panel Data Management

En el panel **Data Management**, las entradas se organizan por lista.

Organización de la entrada

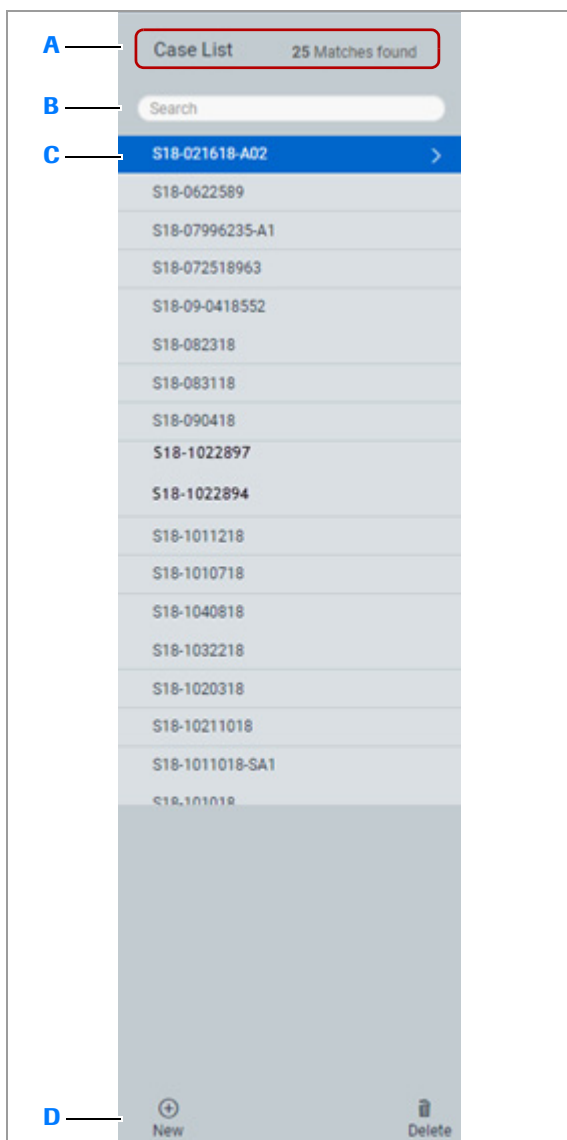

En una lista, puede elegir entre consultar la información o crear o eliminar una entrada. Si necesita localizar una entrada, utilice el cuadro **Search**.

- A** Nombre de la lista y número de entradas
- B** Búsqueda de una entrada
- C** Entradas en la lista
- D** Creación o eliminación de entradas

Rellenar formularios de entradas

The screenshot shows a web form divided into two sections: 'Case Information' and 'Patient Information'.

Case Information:

- Case ID ***: A text input field containing the number '1'.
- Lab Site ***: A text input field containing 'MV'.
- Tissue Type ***: A dropdown menu with 'Breast' selected.
- External Case ID**: An empty text input field.

Patient Information:

- Find Patient**: A search bar with a 'Search' button and a 'Filter: Name' dropdown.
- First Name ***: An empty text input field.
- Last Name ***: An empty text input field.
- Patient ID ***: An empty text input field.
- Gender ***: A dropdown menu with 'Female' selected.
- Date Of Birth**: A date picker showing 'MM/dd/yyyy'.
- Patient age at the time of specimen collection**: An empty text input field.

Un asterisco en rojo indica que es obligatorio introducir información en el campo.

Debe realizar una entrada para un campo obligatorio antes de guardar. Los campos opcionales se pueden dejar vacíos y se pueden actualizar más adelante.

Si un campo tiene un requisito específico para la entrada, como la fecha de nacimiento, el formato requerido se muestra en el campo.

En los campos Search, puede introducir varios caracteres y ver una lista de las opciones que coinciden con su entrada. Cuando se proporcionan Filtros junto al campo Search, puede seleccionar uno o varios de ellos para acotar los resultados de la búsqueda.

Firm. ROBERTA MAFLE MOZZA
 PRODUCTOS ROCHE S.A. de C.V.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL

Tareas de gestión de datos compartidas para los casos

Contenidos de esta sección

- Creación y modificación de los casos (300)
- Creación y modificación de entradas del paciente (312)
- Creación y modificación de entradas del médico (314)
- Búsqueda de una entrada en la gestión de datos (316)
- Eliminación de un paciente o un médico (317)

Creación y modificación de los casos

Contenidos de esta sección


- Acerca de los casos (300)
- Acerca de la gestión de casos pendientes (301)
- Creación de un caso nuevo (302)
- Modificación de un caso (310)
- Eliminación de un caso (311)

Acerca de los casos

Los casos se crean y se revisan en [Data Management > Cases](#) e incluye los casos activos e inactivos (cancelados, archivados). En uPath software, el caso se muestra a los patólogos en la tabla [ALL ACTIVE CASES](#) con un estado Pending.

Un caso parcial se crea cuando cierta información no está disponible, por ejemplo, los escaneados de portaobjetos pendientes solicitados por un patólogo.

Un caso no se puede cerrar ni archivar hasta que el patólogo haya examinado todos los portaobjetos del caso, incluidas las nuevas solicitudes y repetición de escaneados de los portaobjetos.

 Los Administrator Settings controlan los centros que pueden ver el caso.

Tipos de flujos de trabajo del caso

El origen de la muestra y la afiliación del patólogo definen los flujos de trabajo. En todos los casos, el histotécnico prepara los portaobjetos en el laboratorio del centro.


Flujo de trabajo	Origen de la muestra	Lugar dónde se preparan los portaobjetos	Lugar dónde el patólogo evalúa la muestra	Análisis manual o automatizado
Integrated View (Treating MD)	Médico que trata al paciente en el centro	Centro del médico que trata al paciente y del histotécnico (laboratorio)	Patólogo del centro	Automatizado o manual
Integrated View (Client)	Patólogo (cliente) externo	El centro del histotécnico (laboratorio) y del médico que trata al paciente es externo	Patólogo del centro	Automatizado o manual
TechView342	Patólogo (cliente) externo	El centro del histotécnico (laboratorio) y del médico que trata al paciente es externo	Patólogo (cliente) externo	Automatizado
TechView361	Patólogo (cliente) externo	El centro del histotécnico (laboratorio) y del médico que trata al paciente es externo	Patólogo (cliente) externo	Manual

☰ Categorías de flujo de trabajo

Acerca de la gestión de casos pendientes

Es posible que los casos activos requieran actualizaciones, como una asignación del patólogo o la adición de imágenes de portaobjetos.

Con la lista [uPath > All Active Cases](#) de la pantalla CASES puede visualizar los casos que requieren una asignación del patólogo o portaobjetos asociados con el caso.

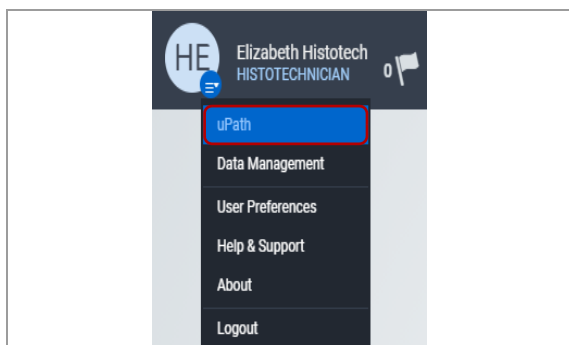

Notify me:	Notification	Toast	Email
New slide request	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Re-scan request	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Puede recibir notificaciones para solicitudes de portaobjetos mediante un indicador de notificaciones en la barra de menú Quick Action, una indicación (banner de notificación) y/o un correo electrónico. Puede establecer la opción **Notifications** en **User Preferences**.

Revise las nuevas solicitudes de portaobjetos en la tabla [Data Management > Requests > Pending Requests](#).

Creación de un caso nuevo

Puede crear un caso nuevo con información completa o con información parcial que puede actualizar más adelante.

Un caso parcial se crea cuando se introduce la información del campo obligatorio, pero cierta información no está disponible, por ejemplo, los escaneados de portaobjetos pendientes.

Para crear un nuevo caso, realice los siguientes procedimientos en esta secuencia:

- Para crear un caso nuevo ▶ (303)
- Para añadir la información del paciente ▶ (304)
- (opcional) Para añadir un nuevo paciente ▶ (304)
- Para añadir información del flujo de trabajo ▶ (305)
- Para añadir información de la muestra a un caso ▶ (306)
- Para añadir información de los portaobjetos a un caso ▶ (307)
- Para asociar los portaobjetos con un caso ▶ (308)
- Para añadir otro caso nuevo ▶ (310)




- Los portaobjetos escaneados son necesarios para completar una asignación del caso.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **Data Management** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de administrador o de histotécnico y los permisos correctos.

Farm. ROBERTA MITLE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstica
 DT & APODERADA LEGAL

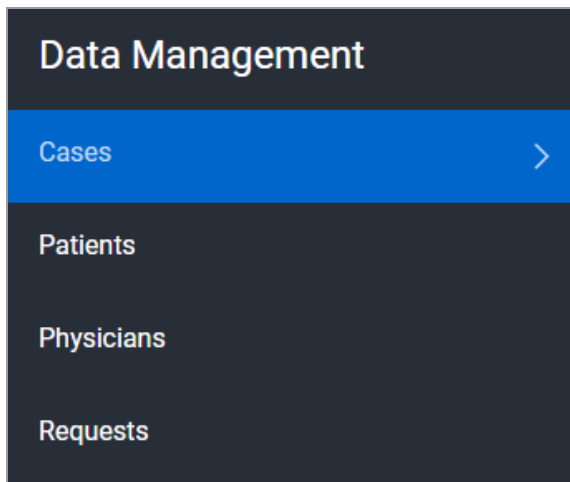

Case Information	
Case ID *	Lab Site *
<input type="text"/>	<input type="text" value="SC"/>
Tissue Type *	External Case ID
<input type="text" value="Breast"/>	<input type="text"/>
Urgent	Case Tags
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Search"/>

► Para crear un caso nuevo

- 1 Seleccione **User Settings > Data Management > Cases**.
 - Un formulario vacío del caso muestra la sección Case Information con el cursor en el campo Case ID.

- 2 En la sección **Case Information**, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos obligatorios:
 - **Case ID***: introduzca la identificación del caso.
 - **Lab Site***: si la entrada actual no coincide con Lab Site, borre el texto que aparece en el campo, comience a introducir el sitio que desee para que se abra una lista con los que se encuentran disponibles para la selección y escoja el sitio de laboratorio de la lista.
 - **Tissue Type***: si la entrada actual no coincide con Tissue Type, borre el texto que aparece en el campo, comience a introducir el tipo de tejido que desee para que se abra una lista con los que se encuentran disponibles para la selección y escoja el tipo de tejido de la lista.
 - ❶ Si se requieren tipos de tejido adicionales, consulte al administrador.

- 3 (Opcional) Introduzca la información en los campos siguientes:
 - **External Case ID**: introduzca un identificador opcional, si su instalación lo utiliza.
 - **Case Tags**: escriba texto descriptivo para buscar y recuperar casos.
 - **Urgent**: marque la casilla de verificación para aumentar la prioridad del caso, de forma que se muestre en fuente de color rojo en todas las carpetas **CASES** oportunas.

Patient Information

Find Patient

Search

Filter: Name Patient ID Date Of Birth

10 Matches found

Demo	3404971	28-02-1962
Harold	9380107	16-05-1960
Janet	8010519	09-08-1967
James	4976635	
Helen	4366601	25-09-1968

Patient Information

Find Patient

Search

Filter: Patient ID Date Of Birth

1 Matches found

John	6489181	04/13/1982
------	---------	------------

Patient Information

Find Patient

Search

Filter: Name Patient ID Date Of Birth

Add Patient

Patient Information

Find Patient

Search

Filter: Name Patient ID Date Of Birth

First Name *

Last Name *

Patient ID *

Gender * Date Of Birth Patient age at the time of specimen collection

Female MM/dd/yyyy

41

DONE

Gender * Date Of Birth Patient age at the time of specimen collection

Female 01/01/1980 41

DONE

► Para añadir la información del paciente

- 1 En la sección **Patient Information**, seleccione el campo **Find Patient** para visualizar una lista de los pacientes disponibles. Seleccione un paciente de la lista.
 - Los campos de la información del paciente están completos.
- 2 Para utilizar un filtro para buscar un paciente, en el cuadro **Search**, seleccione un filtro **Name**, **Patient ID** o **Date of Birth** e introduzca un valor. Seleccione un paciente de la lista.
 - Si no hay pacientes que coincidan con su entrada, se muestra el mensaje «No results matching <name/patient ID/date of birth>».

► (opcional) Para añadir un nuevo paciente

- 1 En la sección **Patient Information**, seleccione el campo **Find Patient** y, a continuación, seleccione el botón **Add Patient**.
 - Los campos en la sección **Patient Information** están disponibles.
- 2 En los campos **First Name** y **Last Name**, introduzca el nombre del paciente.
- 3 En el campo **Patient ID**, introduzca un ID del paciente diferente o deje el número que se ha generado automáticamente.
 - ❶ uPath software genera un ID del paciente automático.
- 4 En la lista desplegable **Gender**, seleccione una entrada.
- 5 (Opcional) En el campo **Date Of Birth**, seleccione el icono del calendario para introducir la fecha o especifíquela en el formato que se muestra en el campo.
 - La **Patient age at the time of specimen collection** se calcula y se muestra automáticamente.
- 6 Seleccione el botón **DONE**.
 - El paciente nuevo se añade a la lista.

► Para añadir información del flujo de trabajo

Workflow Information

Case Workflow *

- Integrated View (Client)
- Integrated View (Treating MD)
- Integrated View (Client)
- TechView342
- TechView361

Search

Treating Physician

Search

Assigned Pathologist

Search

Workflow Information

Case Workflow *

Integrated View (Treating MD)

Client Name

Search

Referring Physician

Search

Treating Physician

Search

Assigned Pathologist

Search

- 1 En la sección **Workflow Information**, seleccione una opción de la lista **Case Workflow***.
 - El campo **Client Name** se convierte en un campo obligatorio si no ha seleccionado Integrated View (Treating MD).
- 2 Si el campo **Client Name*** es visible, comience a introducir el nombre del cliente para ver una lista de los clientes disponibles. Seleccione un cliente de la lista.
 - ❶ Si el cliente no está en la lista, consulte al administrador.
- 3 (Opcional) En los campos **Referring Physician**, **Treating Physician** y **Assigned Pathologist**, comience a escribir para ver una lista de las opciones disponibles. Seleccione una opción de la lista.
 - Solo los patólogos afiliados con el flujo de trabajo estarán disponibles en la lista **Assigned Pathologist**.

-💡- Para que un caso se pueda cerrar, este debe estar asignado a un patólogo. Sin embargo, puede asignar el patólogo más adelante.

- 4 Seleccione el botón **SAVE** . Puede guardar un caso y completarlo más adelante.
 - 💡- Si guarda un caso incompleto, se incluirá en la lista **ALL ACTIVE CASES** del patólogo, pero el patólogo no podrá realizar en el caso.
-

Specimen Information + Add Specimen

00-1 ×

Specimen # * 00-1 Date Received 03/31/2021 Time Received 06:15 PM

Date Collected 03/31/2021 Time Collected 06:15 PM

Specimen Information + Add Specimen

00-1 00-2 **00-3** ×

Specimen # * 00-3 Date Received 03/31/2021 Time Received 06:42 PM

Specimen # * 00-1

Date Collected 03/30/2018 Time Collected 09:14 AM

Tissue Type * ?

Search

Bladder

Breast

Specimen Information + Add Specimen

00-1 **00-2** × 00-3


Specimen # * 00-2 Date Received 03/30/2018 Time Received 09:14 AM

► Para añadir información de la muestra a un caso

- En la sección **Specimen Information**, seleccione el botón Add Specimen para añadir una pestaña de la muestra.
 - Para eliminar una muestra, seleccione su pestaña y, a continuación, seleccione el botón ×.
- Seleccione la pestaña para la primera muestra (00-1) e introduzca toda la información obligatoria y la información opcional si es necesario.
- En el campo **Specimen #***, asigne un identificador o deje la entrada predeterminada.
 - Se asigna automáticamente un número secuencial a cada muestra.
- En el campo **Tissue Type***, borre la entrada del campo y comience a introducir la suya para visualizar una lista de los tipos de tejido. Seleccione un tipo de tejido de la lista.
 - Si se requieren tipos de tejido adicionales, consulte al administrador.
- Introduzca la información para cada pestaña de la muestra en el caso.
- Después de que se haya introducido toda la información para cada muestra, seleccione el botón **SAVE**.

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. de I.
 División Diagnóstica
 DT & APODERADA LEGAL

► Para añadir información de los portaobjetos a un caso

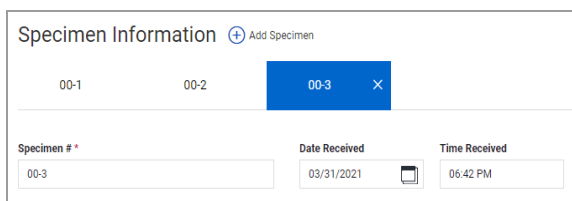


Specimen Information + Add Specimen

00-1 00-2 **00-3** ×

Specimen # * Date Received Time Received

00-3 03/31/2021 06:42 PM

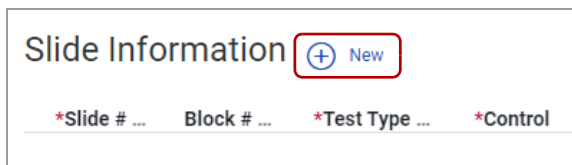


Slide Information + **New**

*Slide # ... Block # ... *Test Type ... *Control



Slide #	Block #	Test Type *	Control*	Scoring Type	Clone Type	External Slide ID	Vendor	Image
00-1		P53	None	Roche-3005	DD-7		Roche	
00-2		HNE	None	None			Roche	

- 1 En la sección **Specimen Information**, seleccione la pestaña de la muestra que desea asociar con los portaobjetos.
- 2 En la sección **Slide Information**, seleccione el botón **New** para añadir un portaobjetos.
- 3 Introduzca la siguiente información obligatoria y opcional:
 - **Slide#***: Introduzca un identificador o deje el número predeterminado.
 - **Block#**: Introduzca un identificador para el bloque de tejido.
 - **Test Type***: Seleccione el campo y, a continuación, seleccione una prueba de la lista que desee asociar con el portaobjetos.
 - **Control***: Seleccione el campo y, a continuación, seleccione un tipo de control que desee asociar con el portaobjetos.
 - **Scoring Type**: se rellena automáticamente si el algoritmo correspondiente está configurado.
 - **Clone Type**: Se rellena automáticamente si el algoritmo correspondiente está configurado.
 - **External Slide ID**: Introduzca un identificador si es necesario.
 - **Vendor**: Seleccione el campo y, a continuación, seleccione un proveedor de la lista.
 - ❶ Compruebe que haya seleccionado la opción correcta en el campo **Test Type***. La opción aplica el algoritmo de puntuación correcto utilizado para analizar el portaobjetos.
- 4 Seleccione el icono de detalles para añadir una nota de los portaobjetos opcional.
- 5 Continúe con la siguiente pestaña de la muestra hasta que toda la información obligatoria y opcional se haya introducido y los portaobjetos se hayan añadido a la muestra.

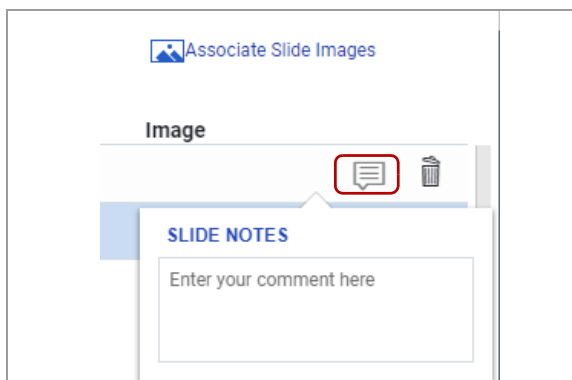

Associate Slide Images

Image

SLIDE NOTES

Enter your comment here

- 6 Continúe con la sección **Specimen Information** para asociar los portaobjetos con un caso.

❶ No puede guardar la información del portaobjetos hasta que haya asociado una imagen del portaobjetos con la información.

► Para asociar los portaobjetos con un caso

- 1 En la sección **Specimen Information**, seleccione la pestaña de la muestra para añadir las imágenes del portaobjetos.

❶ La sección **Slide Information** debe contener como mínimo un portaobjetos para la muestra.


- 2 En la sección **Slide Information**, en la parte superior derecha, seleccione el botón **Associate Slide Images**.


→ Se muestra el cuadro de diálogo **Associate Slide Images**. La información sobre el portaobjetos se encuentra en el lateral izquierdo y las imágenes del portaobjetos en miniatura quedan disponibles en el lateral derecho.

💡 Busque una imagen del portaobjetos situada a la derecha del cuadro de diálogo para asociar con cada portaobjetos que aparece en el lado izquierdo.

- 3 En el campo **SITE**, aparece la ubicación predeterminada en la que se almacenan los portaobjetos. Seleccione un sitio de la lista si la ubicación predeterminada no es aplicable.


- 4 En el campo **File Type**, seleccione todos los tipos de archivos aplicables. Seleccione de nuevo una opción para desmarcar la casilla de verificación.

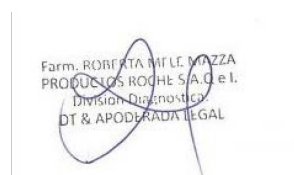

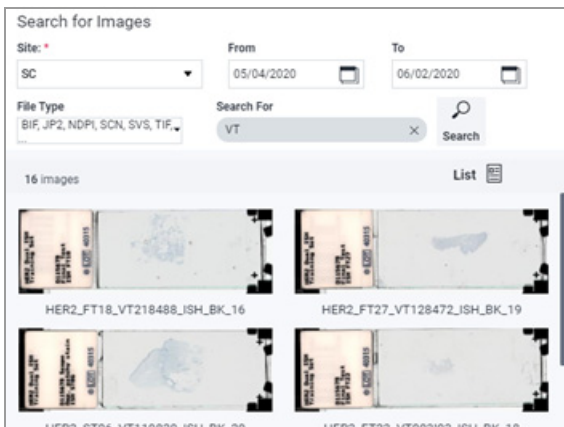


- 5 En el campo **Search For**, realice cualquiera de las operaciones siguientes para localizar un portaobjetos:
 - Introduzca el texto del nombre del archivo del portaobjetos y, a continuación, pulse **Enter** para buscarlo en la lista de las imágenes.
 - Seleccione la herramienta del calendario o introduzca las fechas en los campos **From** y **To**, y seleccione a continuación el campo **Search For** y pulse **Enter**.
- Los portaobjetos se muestran a la derecha del cuadro de diálogo **Associate Slide Images**.


💡 Si borra los campos **From** y **To**, coloque el cursor en el campo **Search For**, a continuación pulse Intro en el teclado y se mostrarán todos los portaobjetos en el IMS.

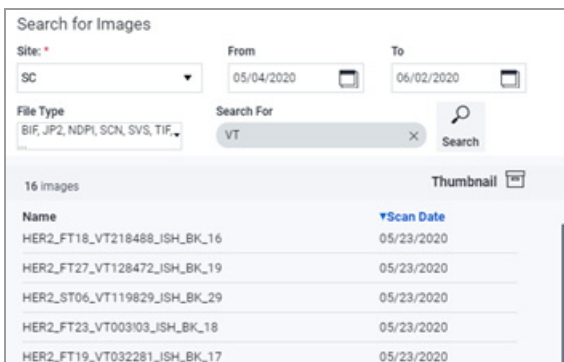

- 6 Identifique la imagen del portaobjetos requerida para el primer portaobjetos de la tabla.
 - Con la barra de desplazamiento puede consultar los portaobjetos.
 - ❗ Si no aparecen los portaobjetos, consulte al administrador.
- 7 Para ver los nombres de archivo de las imágenes del portaobjetos, seleccione el botón . Aparecerá una lista con imágenes de portaobjetos y fechas de exploración.
 - Seleccione el botón para ver las imágenes en miniatura.

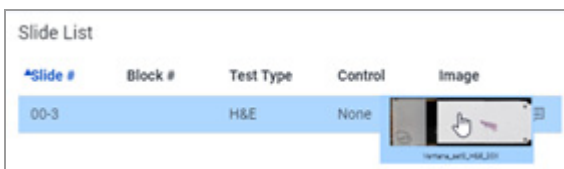

- 8 Seleccione la imagen del portaobjetos y arrástrela hacia el campo **Image**.
 - ❗ Si asocia un portaobjetos incorrecto, puede arrastrar otro portaobjetos para sobrescribirlo.

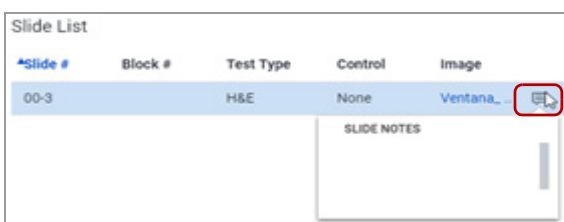

- 9 (opcional) Seleccione el icono de detalles situado en la tabla de portaobjetos y añada una nota del portaobjetos.
- 10 Repita el proceso para todos los portaobjetos de la tabla.
 - ❗ El patólogo no puede completar el caso hasta que todos los portaobjetos estén disponibles.

- 11 Seleccione el botón **SAVE**.
→ Se cierra el cuadro de diálogo **Associate Slide Images** y aparece el formulario del caso.
- 12 Seleccione el botón **SAVE**. El caso aparece en **Case List**.

► Para añadir otro caso nuevo

- 1 Después de que haya guardado un caso, desplácese hacia la parte inferior de **Case List**.
- 2 Seleccione el botón **New**.
→ Se muestra un nuevo formulario vacío del caso con secciones para introducir información del caso, el paciente, el flujo de trabajo y la muestra.

Modificación de un caso


Puede modificar la información del caso, el paciente, la muestra o el portaobjetos para un caso.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **Data Management** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de administrador o de histotécnico y los permisos correctos.

► Para modificar un caso

- 1 Seleccione **User Settings > Data Management > Cases** y, a continuación, seleccione un caso de **Case List**.
- 2 Modifique las entradas en las secciones **Case Information**, **Patient Information**, **Workflow Information** y **Slide Information**.
- 3 Para eliminar un portaobjetos de una muestra, en la sección **Slide Information**, seleccione la pestaña de la muestra y, a continuación, seleccione el botón  situado al lado del portaobjetos que desea eliminar.
 - ❶ No puede eliminar un portaobjetos del cuadro de diálogo **Associate Slide Images**.

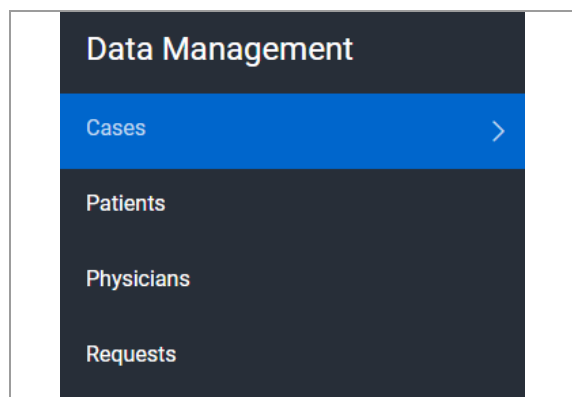

Eliminación de un caso

Si desea eliminar un caso de uPath software, elimínelo de la lista de casos.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **Data Management** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de administrador o de histotécnico y los permisos correctos.

► Para eliminar un caso


- 1 Seleccione el botón **User Settings** y, a continuación, **Data Management > Cases**.

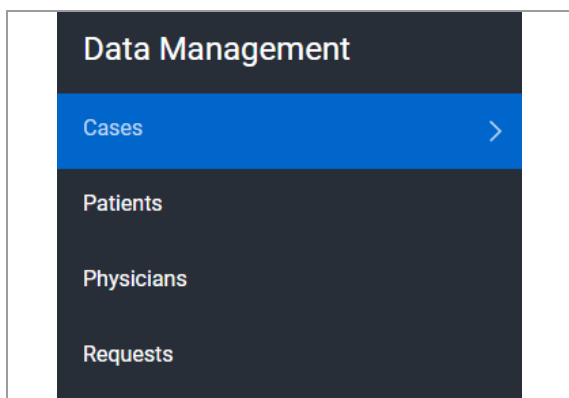


- 2 Escoja uno de los casos de la lista **Case List** situada en el panel izquierdo.

- 3 Seleccione el botón **Delete**.

→ Se muestra un banner de notificación en azul con los dos pasos que debe seguir para eliminar el caso.

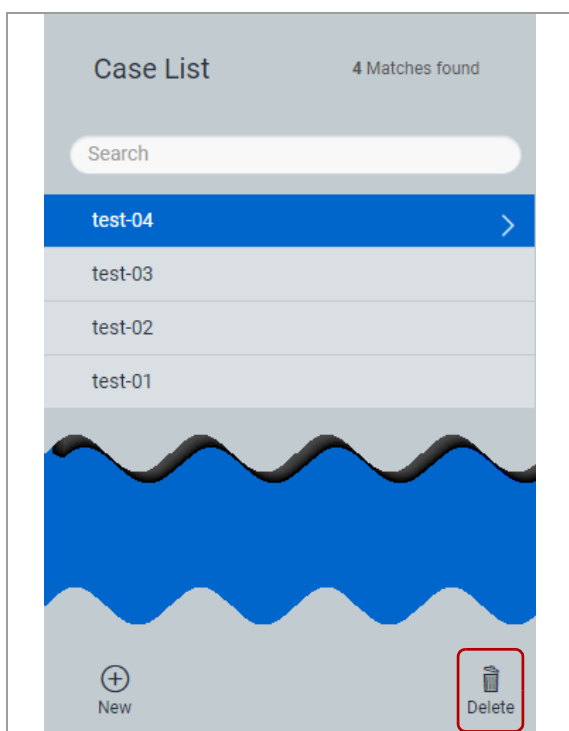

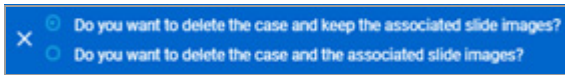


- 4 Seleccione una opción para eliminar el caso:
 - Seleccione el primer botón para eliminar el caso y mantener las imágenes del portaobjetos asociadas. Seleccione el botón **Yes**.
 - Seleccione el segundo botón para eliminar el caso y las imágenes del portaobjetos asociadas. Seleccione el botón **Yes**.
 - Si elimina los portaobjetos, se eliminarán del IMS y dejarán de estar disponibles para asociarlos con otro caso.
 - Si selecciona el botón **Yes**, se eliminará el caso y automáticamente desaparecerá de la lista de casos del patólogo.

Creación y modificación de entradas del paciente

Tendrá que introducir la información del paciente para crear un caso.

 Se pueden crear nuevas entradas del paciente cuando cree un caso en la sección **Patient Information** en el formulario del caso.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de administrador o de histotécnico y los permisos correctos.


Para crear o modificar una entrada del paciente, realice los siguientes procedimientos:

- Para añadir un nuevo paciente ▶ (312)
- Para modificar una entrada del paciente ▶ (313)




▶ Para añadir un nuevo paciente

- 1 Seleccione **User Settings > Data Management > Patients**.

- Un formulario vacío del paciente muestra la sección **Patient Information** con el cursor en el campo **First Name***.

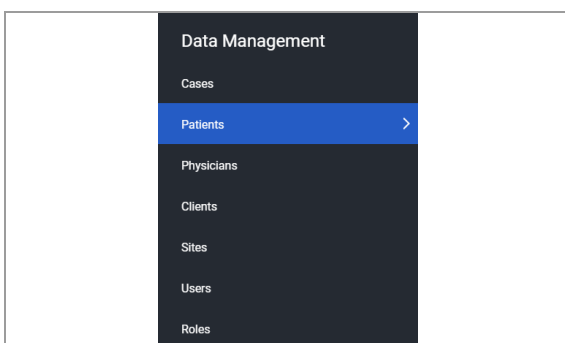

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
PRODUCOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

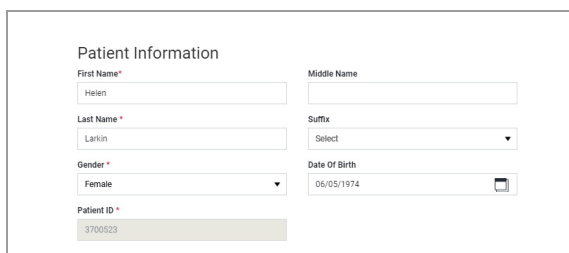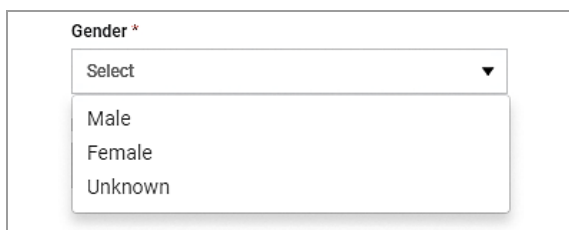2 Introduzca toda la información obligatoria e introduzca la información opcional si es necesario:

- **First Name*** (obligatorio)
- **Middle Name** (opcional)
- **Last Name*** (obligatorio)
- **Patient ID*** (obligatorio)
- **Date Of Birth** (opcional)

❶ uPath software genera un ID del paciente automático. Puede anular este número introduciendo un ID del paciente diferente, o conservar el número generado automáticamente.

3 En la lista desplegable **Gender***, seleccione una entrada.

4 (opcional) En la sección **Contact Information**, introduzca la información para cada campo según sea necesario.


5 (opcional) En el cuadro de texto **Medical History**, introduzca la anamnesis del paciente disponible.


6 Seleccione el botón **SAVE**. El paciente se muestra en la **Patient List**.

7 Para añadir otro paciente nuevo, seleccione el botón **New** situado en la parte inferior de Patient List.
→ Se muestra un nuevo formulario vacío del paciente con secciones para la información del paciente y de contacto.

► Para modificar una entrada del paciente

1 Seleccione **User Settings > Data Management > Patients** y seleccione un paciente de la **Patient List**.

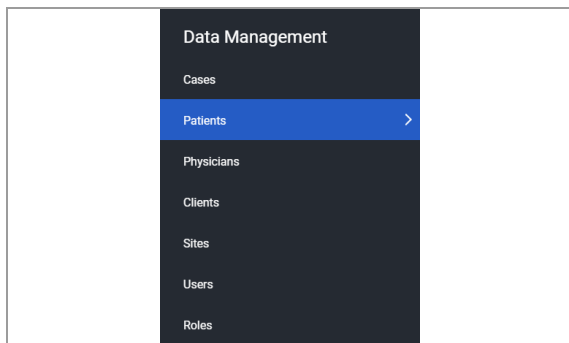

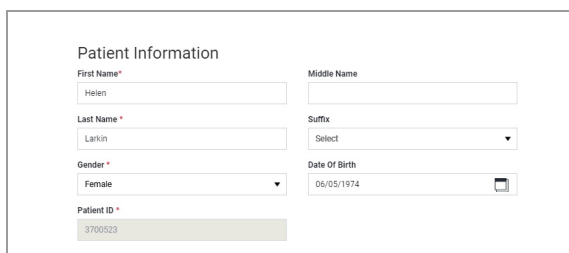

Patient Information

First Name*
Helen

Middle Name

Last Name*
Larkin

Suffix
Select

Gender*
Female

Date Of Birth
06/05/1974

Patient ID*
3700523

- 2 Modifique las entradas en la sección **Patient Information**, la sección **Contact Information** o el cuadro de texto **Medical History** y, a continuación, seleccione el botón **SAVE**.

Creación y modificación de entradas del médico

Puede crear nuevas entradas del médico y, a continuación, añadir la entrada para un caso. También puede editar un caso para añadir información del médico. No puede crear una nueva entrada del médico en la pantalla del caso.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de administrador o de histotécnico y los permisos correctos.

Para crear o modificar una entrada del médico, realice los siguientes procedimientos:

- Para añadir un médico nuevo ▶ (314)
- Para modificar una entrada del médico ▶ (315)

▶ Para añadir un médico nuevo

- 1 Seleccione **User Settings > Data Management > Physicians**.
→ Un formulario vacío del médico muestra la sección **Physician Information** con el cursor en el campo **Physician First Name***.

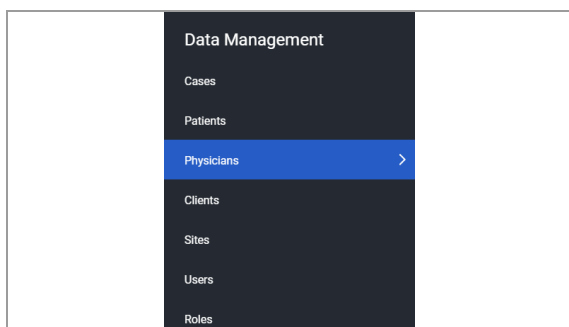

Farm. ROBERTA M.F.L. MAZZA
PRODUCOS LOS ROCHE S.A. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Physician Information

Physician First Name * Physician Middle Name

Physician Last Name * Suffix

Medical Specialty Is Active

External Physician Id

2 Introduzca toda la información obligatoria e introduzca la información opcional si es necesario y está disponible:

- **Physician First Name*** (obligatorio)
- **Physician Middle Name** (opcional)
- **Physician Last Name*** (obligatorio)
- **Medical Specialty** (opcional)
- **External Physician Id** (opcional)

Physician Information

Physician First Name * Physician Middle Name

Physician Last Name * Suffix

Medical Specialty Is Active

External Physician Id

3 En la sección **Physician Information**, seleccione una opción de si es necesario y está disponible:

- **Suffix** (opcional)
- **Is Active** (opcional)

❶ El elemento predeterminado para el campo **Is Active** es **Yes**. Cambie este campo a **No** para evitar que se asocie un médico inactivo con un caso nuevo.

Contact Information

Street 1

Street 2

City

State/ Province Zip/ Postal Code

Country/ Region Office Tel#

Fax# Mobile#

Email

4 En la sección **Contact Information**, todos los campos son opcionales. Introduzca la información opcional para cada campo según sea necesario y esté disponible.

5 Seleccione el botón **SAVE**. El médico se muestra en la **Physician List**.

6 Para añadir otro médico, seleccione el botón **New** situado en la parte inferior de Physician List.
→ Se muestra un nuevo formulario vacío del médico con secciones para la información del médico y de contacto.

► Para modificar una entrada del médico

1 Seleccione **User Settings > Data Management > Physicians** y, a continuación, seleccione un médico de la **Physician List**.

Data Management

- Cases
- Patients
- Physicians** >
- Clients
- Sites
- Users
- Roles

Patient Information

First Name*	Middle Name
Helen	
Last Name*	Suffix
Larkin	Select
Gender*	Date Of Birth
Female	06/05/1974
Patient ID *	
3700523	

- 2 Modifique las entradas en la sección **Physician Information** y la sección **Contact Information**, y seleccione a continuación el botón **SAVE**.

Búsqueda de una entrada en la gestión de datos

Es posible que necesite buscar un caso, paciente, médico, cliente, centro o usuario en la lista de gestión de datos.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de administrador o de histotécnico y los permisos correctos.


► Para buscar una entrada

- 1 Seleccione **User Settings > Data Management** y, a continuación, seleccione una opción de la lista.

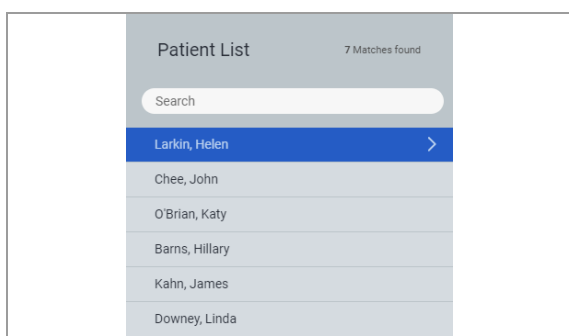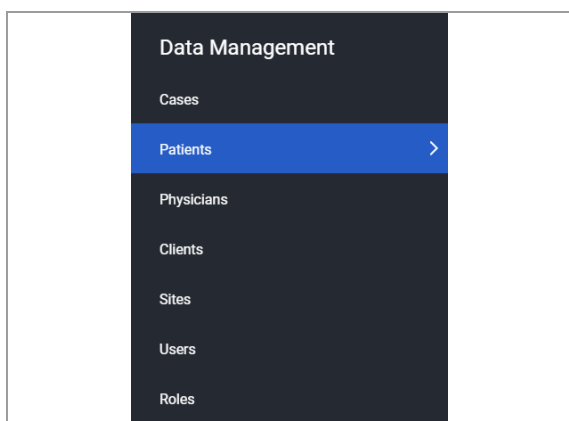


- 2 En el campo **Search**, introduzca el valor que desea buscar.
 - ❶ Se puede introducir un identificador o un nombre completo o parcial.
 - Se muestran los resultados que coincidan con la búsqueda, o se muestra el texto “No results matching <search term>”.

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUCIOS ROCHE S.A. Q. de I.
 División Distribución
 DT & APODERADA LEGAL

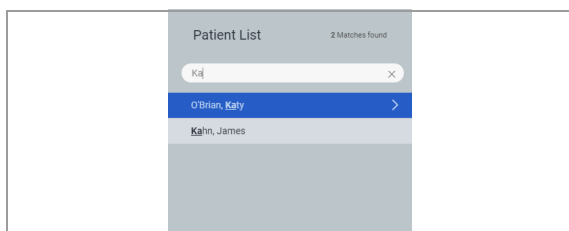


- 3 Si varios resultados coinciden con el valor de la búsqueda, seleccione la entrada que desea visualizar.

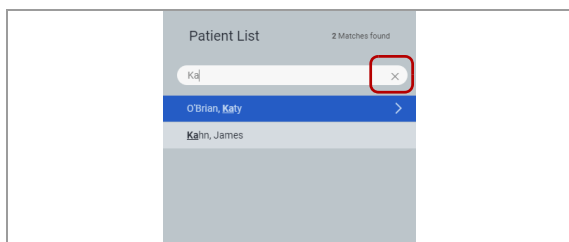

- 4 En el campo **Search**, seleccione el icono Close para borrar la entrada.

Eliminación de un paciente o un médico

Puede eliminar un paciente o un médico de la lista.

 Si un paciente o un médico está asociado con un caso activo o existente, el paciente o el médico no se puede eliminar de la lista.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **Data Management** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de administrador o de histotécnico y los permisos correctos.

► Para eliminar una entrada

- 1 Seleccione **Data Management** y, a continuación, seleccione **Patients** o **Physicians** de la lista.
- Se muestra la lista y la información, dependiendo de su elección.

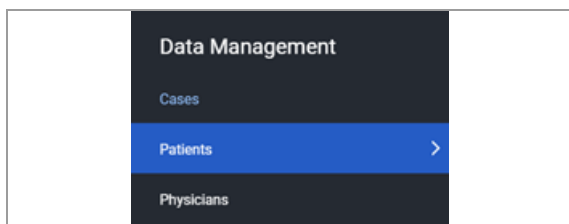

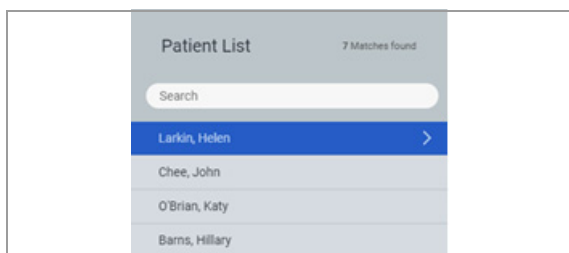

- 2 Seleccione una entrada y, a continuación, seleccione el botón **Delete** situado en la parte inferior del panel.
→ Se muestra una notificación en banner azul.
- 3 Seleccione **Yes** para eliminar la entrada, o **No** para cancelar.

Farm. ROBERTA MIT LE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. Q. de I.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL

Tareas del administrador en la gestión de datos

Contenidos de esta sección

- Creación y modificación de clientes (319)
- Creación y modificación de centros (320)
- Eliminación de un cliente o un centro (321)
- Gestión de las cuentas de usuario (322)
- Creación y modificación de funciones de usuario (326)

Creación y modificación de clientes

Solo el administrador puede añadir un nuevo cliente o eliminar las entradas obsoletas.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para añadir un nuevo cliente

- 1 Seleccione **User Settings > Data Management > Clients**.
- 2 Seleccione el botón **New** situado en la parte inferior de la lista **Clients list**.

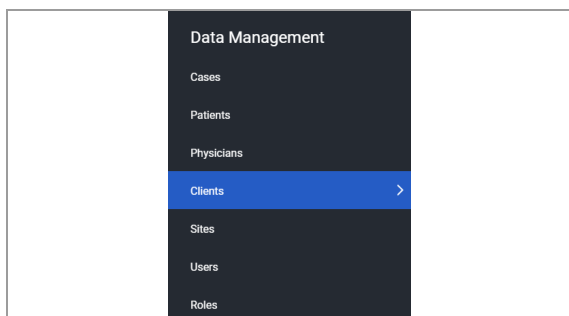

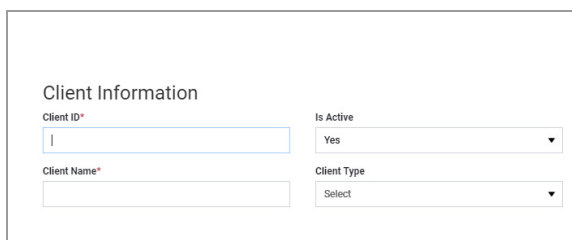

- 3 En la sección **Client Information**, introduzca la siguiente información:
 - **Client ID*** (obligatorio): Introduzca un identificador del cliente.
 - **Client Name*** (obligatorio): Introduzca un nombre.
 - **Is Active** (opcional): La entrada predeterminada es **Yes**. Cambie la entrada a **No** para eliminar el cliente como una opción cuando cree un caso.
 - **Client Type** (opcional): Seleccione **Hospital** o **Lab**.
- 4 En la sección **Contact Information**, todos los campos son opcionales. Introduzca la información para cada campo según sea necesario.
- 5 Seleccione el botón **SAVE**.

📖 **Temas relacionados**

- Eliminación de un paciente o un médico (317)

Creación y modificación de centros

Puede añadir nuevos centros a uPath software o eliminar las entradas obsoletas.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para añadir un nuevo centro

- 1 Seleccione **User Settings > Data Management > Sites**.
- 2 Seleccione el botón **New** situado en la parte inferior de la lista **Sites**.

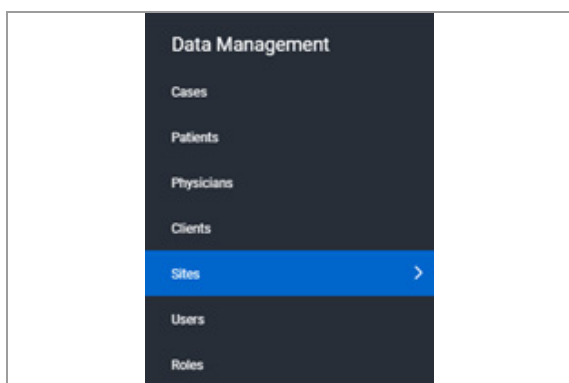

Farm. ROBERTA AMLE MOZZA
 PRODUCOS ROCHE S.A. S. r.l.
 Division Diagnostica
 DT & APODERADA LEGAL

- 3 En la sección **Site Information**, introduzca la siguiente información:
 - **Site Name*** (obligatorio): Introduzca un nombre.
 - **Site Description*** (obligatorio): Introduzca una descripción.
 - ❶ Solo se muestra site name en site list cuando seleccione un centro durante la creación del caso.
- 4 Seleccione el botón **SAVE**.

📖 **Temas relacionados**

- Eliminación de un cliente o un centro (321)

Eliminación de un cliente o un centro

Puede eliminar un cliente o un centro de uPath software.

💡 Si un cliente o un centro está asociado con un caso activo o existente, el cliente o el centro no se puede eliminar de la lista.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para eliminar una entrada

- 1 Seleccione **User Settings > Data Management** y, a continuación, seleccione **Clients** o **Sites**.
 - Se muestra la lista y la información, dependiendo de su elección.

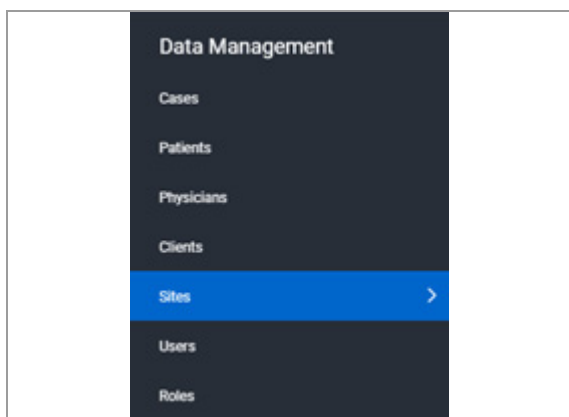

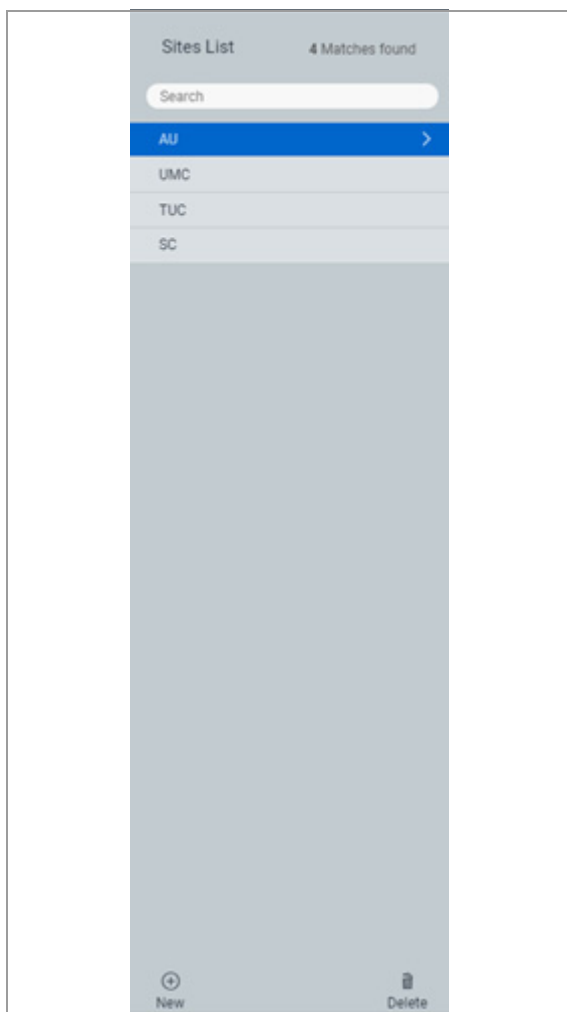

- 2 Seleccione una entrada y, a continuación, seleccione el botón **Delete** situado en la parte inferior del panel.
→ Se muestra una notificación en banner azul.
- 3 Seleccione **Yes** para eliminar la entrada, o **No** para cancelar.

Gestión de las cuentas de usuario

Contenidos de esta sección

- Creación de una nueva cuenta de usuario (322)
- Desactivación de cuentas de usuario (324)
- Eliminación de cuentas de usuario (325)

Creación de una nueva cuenta de usuario

Solo el administrador puede añadir nuevos usuarios a uPath software o eliminar las entradas obsoletas.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

Farm. ROBERTA INFLEZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A.C. e.l.
Division Diagnostico
DT & APODERADA LEGAL

► Para añadir un nuevo usuario

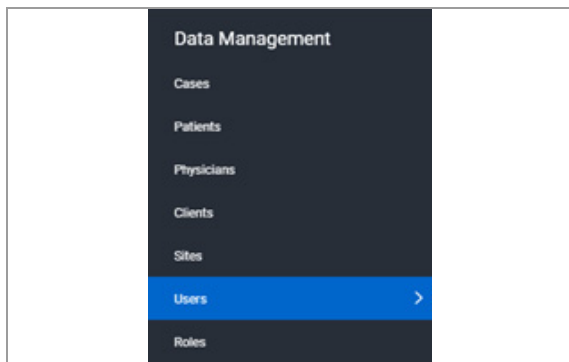

1 Seleccione **User Settings > Data Management > Users**.

2 Seleccione el botón **New** situado en la parte inferior de la lista **Users**.

→ Se muestra el formulario **User**.

 A screenshot of the 'User' creation form. It includes the following fields: 'Email *' (text input), 'First Name *' (text input), 'Middle Name' (text input), 'Last Name *' (text input), 'Suffix' (dropdown menu with 'Select' option), and 'Is Active' (dropdown menu with 'Yes' selected).

3 En el campo **Email**, introduzca la dirección de correo electrónico del usuario.

❶ Para un usuario patólogo, se muestra tanto el correo electrónico como el nombre del usuario en user list al asignar un caso a un patólogo.

4 Para asignar una contraseña, haga lo siguiente:

- **Password*** (obligatorio): Introduzca la asignación de la contraseña inicial para el usuario. El usuario puede cambiar la contraseña cuando inicie sesión por primera vez.
- **Confirm Password*** (obligatorio): Introduzca de nuevo la contraseña para que coincida con la contraseña.

5 Rellene la información del usuario adicional:

- **First Name*** (obligatorio)
- **Middle Name** (opcional)
- **Last Name*** (obligatorio)
- **Suffix** (opcional)
- **Is Active** (opcional): La entrada predeterminada es **Yes**. Cambie este campo a **No** para eliminar los permisos de usuario para este usuario.

6 En la sección **Contact Information**, introduzca la dirección de **Email** del usuario. Cualquier otra información es opcional.

7 En la sección **Role Details**, seleccione una función (obligatorio).

 A screenshot of the 'Role Details' form. It includes: 'Role *' (dropdown menu with 'Select' and options: Administrator, Coordinator, Histotechnician, Pathologist, Pathologist in training), 'Certification' (text input), 'Client' (radio button), 'Site Name *' (text input with 'Search' button), and 'Client Name *' (text input with 'Search' button).

Role Details

Role *
Pathologist

Medical Speciality Certification

Site
 Site Name *
Search

Client
 Client Name *
Search

Role Details

Role *
Pathologist

Medical Speciality Certification

Site
 Site Name *
Search

Client
 Client Name *
Search

Role Details

Role *
Pathologist

Medical Speciality Certification

Site
 Site Name *
Search

Client
 Client Name *
Search

8 Si la función asignada al usuario es «Pathologist», introduzca una **Medical Speciality** y **Certification**, si procede.

❶ Este campo es opcional. Los patólogos con una especialidad se incluirán en la lista de elegibilidad para proporcionar una segunda opinión cuando se requiera una segunda opinión en su ámbito de conocimientos.

9 Seleccione la opción **Site** o **Client** (obligatorio), dependiendo de la afiliación del usuario.

❶ Un histotécnico está siempre asociado con el centro.

10 Introduzca **Site Name*** o **Client Name***.

- Para introducir un nombre, comience a introducir el nombre en el campo **Site Name*** o **Client Name***.

→ Se muestran todas las entradas disponibles que empiezan con la letra que haya introducido.

11 Seleccione el botón **SAVE**.

Desactivación de cuentas de usuario

Se pueden desactivar las cuentas de usuarios, médicos o clientes en uPath software. Esto puede ser necesario cuando dejen de estar asociadas con un centro.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

Farm. ROBERTA M.F.L. MOZZA
PRODUCOS ROCHE S.A. C.e.L.
Division Diagnostica
DT & APODERADA LEGAL


► Para desactivar un médico, usuario o cliente

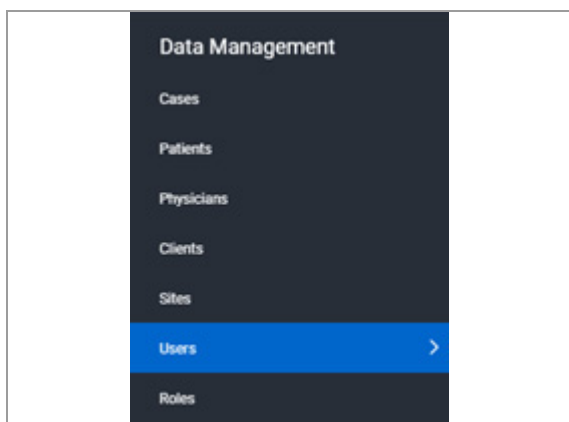

- 1 Seleccione **User Settings > Data Management >** y, a continuación, seleccione **Physicians, Clients** o **Users** para desactivar una entrada.

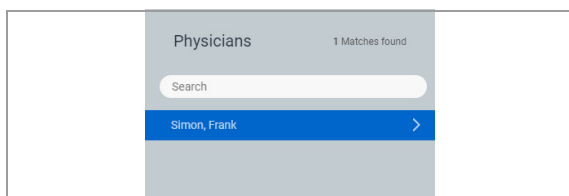


- 2 En la lista, seleccione la entrada que desea desactivar.

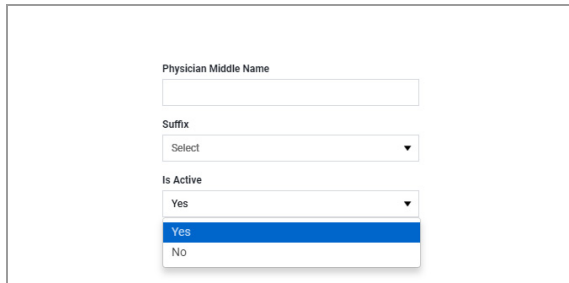

- 3 En la lista desplegable del campo **Is Active**, seleccione **No**.
- 4 Seleccione el botón **SAVE**.
 - El médico, usuario o cliente desactivado dejará de ser una opción disponible en uPath software.
 - Los usuarios y los clientes desactivados dejarán de poder iniciar sesión en uPath software.

Eliminación de cuentas de usuario



Las cuentas de usuarios o de clientes se pueden eliminar de forma permanente de uPath software.

 Si una cuenta de usuario está asociada con un caso activo o existente, la cuenta de usuario no se puede eliminar de la lista.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

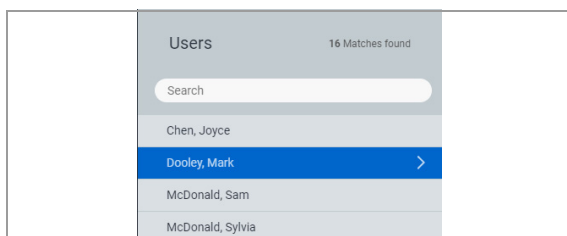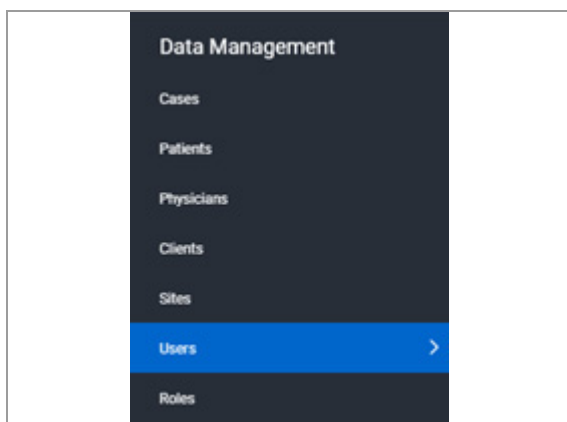


► Para eliminar una entrada de la cuenta de usuario

- 1 Seleccione **User Settings > Data Management** y, a continuación, seleccione **Clients** o **Users** para eliminar una entrada.
- 2 En la lista, seleccione la entrada que desea eliminar.
- 3 En la parte inferior del panel de la lista, seleccione el botón .
 - ❶ Un elemento eliminado **NO SE PUEDE** recuperar.
 - Se muestra una notificación azul que le indica que confirme la eliminación.
- 4 Para confirmar la eliminación, seleccione el botón **Yes**, o para cancelar la eliminación, seleccione el botón **No**.
 - Si selecciona **Yes**, se muestra momentáneamente una notificación verde que confirma la correcta eliminación del elemento. El elemento deja de aparecer en la lista.

Creación y modificación de funciones de usuario

Contenidos de esta sección


- Acerca de funciones y permisos de usuario (327)
- Creación de una nueva función de usuario (328)
- Cambio del nombre de una función de usuario (329)
- Modificación de una función de usuario (330)
- Eliminación de una función de usuario (332)

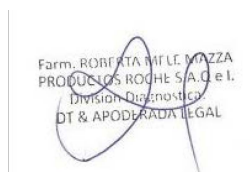

Acerca de funciones y permisos de usuario

En uPath software, se asigna una función y unos permisos a un usuario para que lleve a cabo tareas específicas. Puede utilizar las funciones de usuario predeterminadas en uPath software o crear sus propias funciones.

Organización de las funciones

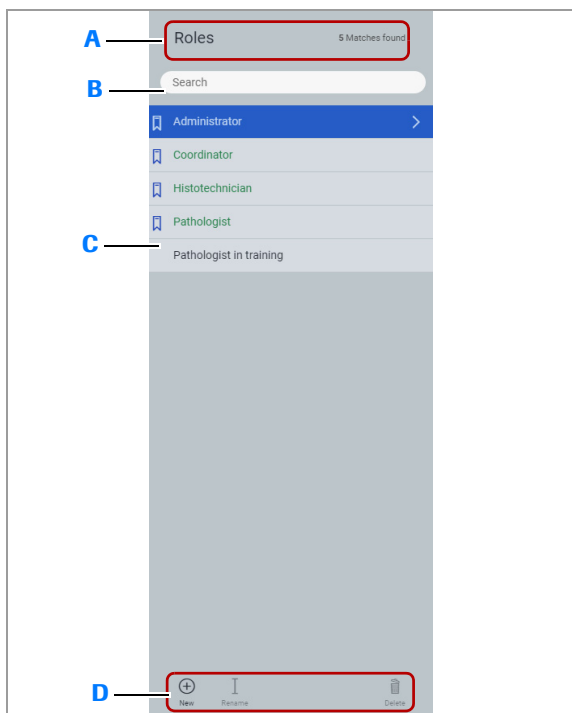


- A** Nombre de la lista y número de entradas
- B** Búsqueda de una entrada
- C** Entradas en la lista
- D** Creación, cambio del nombre o eliminación de las entradas

En el panel **Roles**, las entradas se organizan en una lista.

Puede crear, cambiar el nombre o eliminar una función. Si necesita localizar una función en la lista, utilice el cuadro **Search**.

Las funciones predeterminadas en uPath software se muestran de color verde con un icono de marcador y no se pueden eliminar.

Lista de permisos

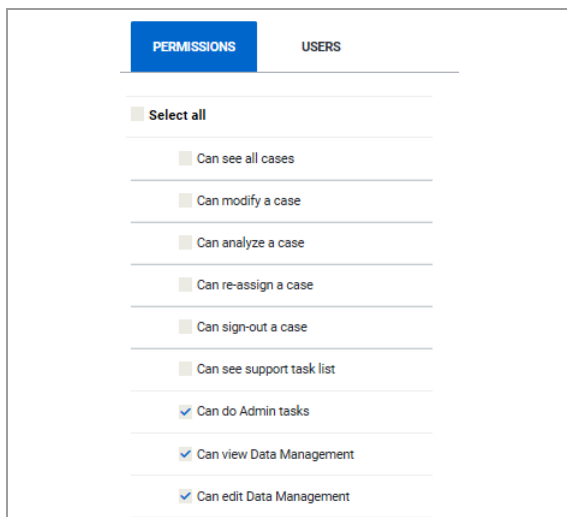

Puede seleccionar de una lista de permisos predeterminados que puede asignar a una función. La lista de permisos no se puede editar.

Creación de una nueva función de usuario

Las funciones del administrador, el coordinador, el histotécnico y el patólogo tienen permisos predeterminados que no se pueden editar. Sin embargo, puede crear una nueva función con un conjunto de permisos diferentes y, a continuación, asignar esta nueva función a un usuario.

Solo a las funciones creadas por el administrador (que se muestran de color negro) se les puede cambiar el nombre, editar o eliminar.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para crear una nueva función

- 1 Seleccione **User Settings > Data Management > Roles**.

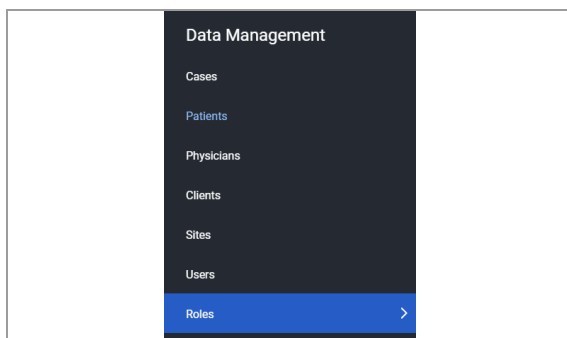


- 2 En la parte inferior del panel de la lista **Roles**, seleccione el botón **New**.

→ Se muestra un campo nuevo en la parte inferior de la lista.


- 3 En el campo, introduzca el nombre para la nueva función.

- 4 Pulse la tecla Intro para añadir la entrada a la lista.

→ Se muestra momentáneamente una notificación en banner verde que confirma la correcta adición de la función.

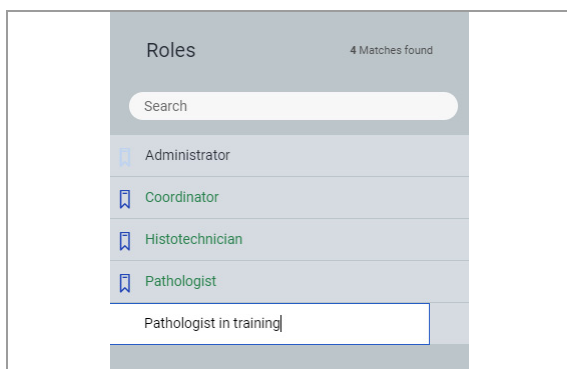

Farm. ROBERTA MITTE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A.C e.l.
Division Diagnostico
DT & APODERADA LEGAL

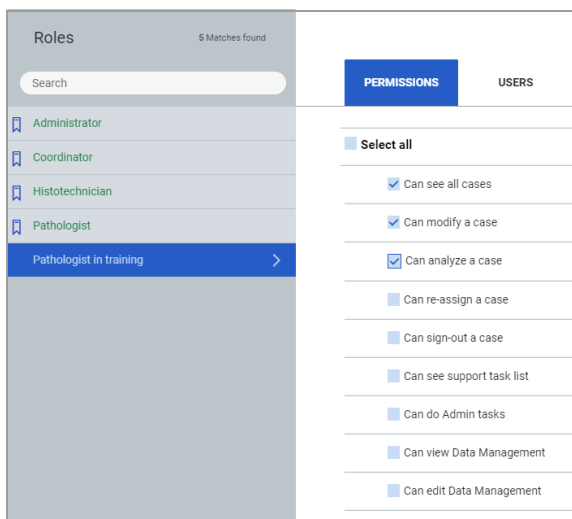

5 En la pestaña **PERMISSIONS**, seleccione la casilla de verificación situada al lado de cada permiso que desea asignar a la función.

6 Seleccione el botón **SAVE**.

→ Se muestra una notificación en banner azul que le indica que confirme. Para confirmar, seleccione **Yes**.

→ La nueva función está incluida en la lista del panel **Roles** y se puede asignar la nueva función a los usuarios.

Cambio del nombre de una función de usuario

Puede cambiar el nombre de una función de usuario y mantener o cambiar los permisos asignados a la función.





Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.


► Para cambiar el nombre de una función

- 1 Seleccione **User Settings > Data Management > Roles**.

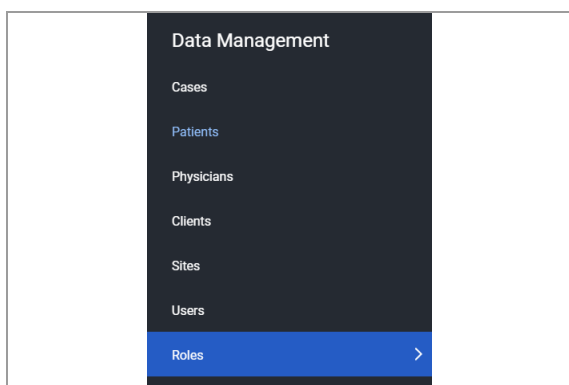

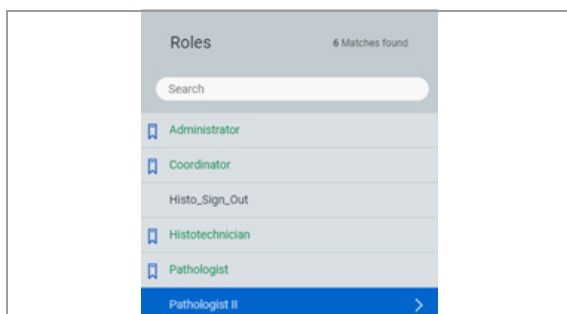


- 2 Seleccione la función a la que desea cambiar el nombre.

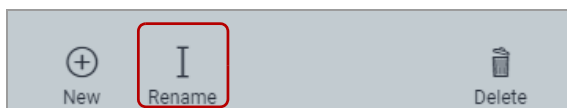


- 3 En la parte inferior de la lista **Roles**, seleccione el botón **Rename**.

→ Una nueva función aparece en la lista.

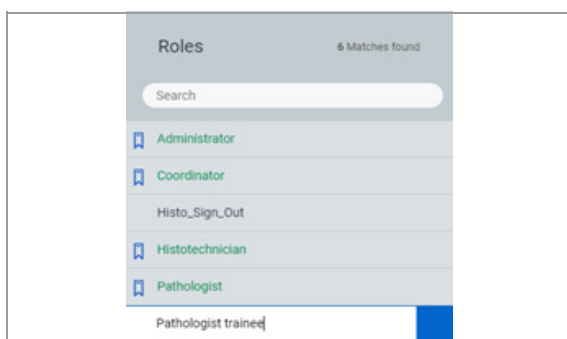

- 4 Introduzca el nombre nuevo para la función.

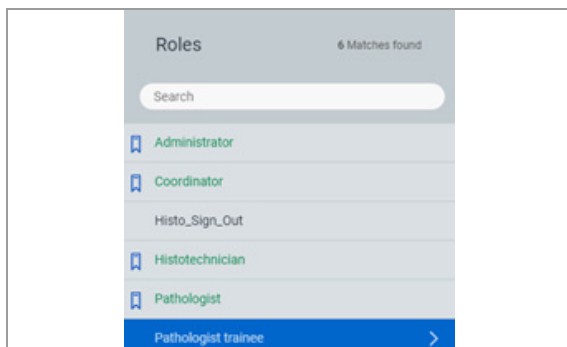

- 5 Pulse la tecla Intro para añadir la función a la lista.

→ Se muestra momentáneamente una notificación en banner verde que confirma el correcto cambio de nombre de la función.

Modificación de una función de usuario


Puede realizar cambios en una función asignando o eliminando permisos.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.

► Para modificar una función

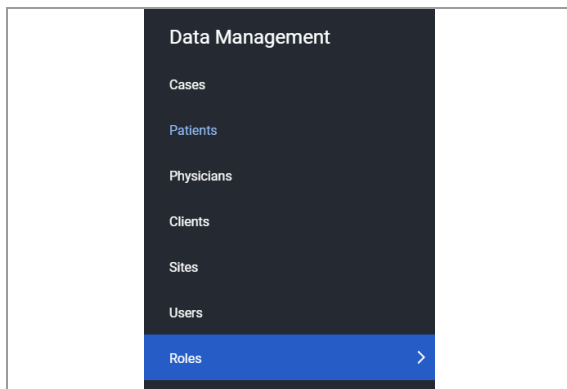


- 1 Seleccione **User Settings > Data Management > Roles**.

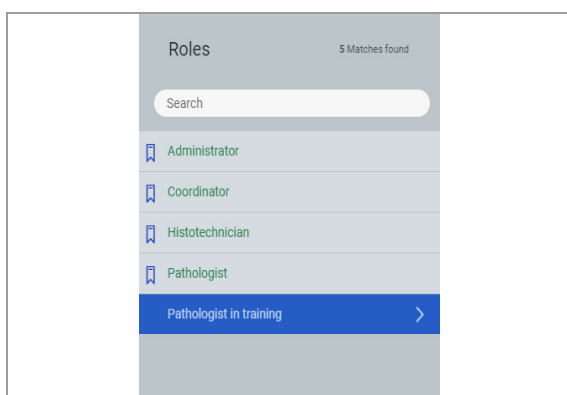

- 2 Seleccione una función que desee modificar.
 - ❶ No puede editar las funciones predeterminadas que se muestran de color verde.




- 3 Seleccione la pestaña **PERMISSIONS**. Seleccione una casilla de verificación situada al lado de un permiso para añadirlo a la función o desmarque la casilla de verificación para eliminarlo de la función.
- 4 Para guardar los cambios, seleccione el botón **SAVE**.
 - Se muestra una notificación en banner azul que le advierte que los cambios se aplicarán a todos los usuarios asignados a la función y le indica que confirme las actualizaciones. Para confirmar los cambios, seleccione **Yes**.
- 5 Para descartar los cambios, seleccione el botón **CANCEL**.
 - Se muestra una notificación en banner azul que le indica que confirme. Para confirmar, seleccione **Yes**.

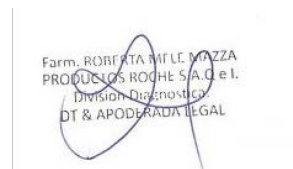

Eliminación de una función de usuario

Si el administrador ha creado una función de usuario que deja de ser necesaria, puede eliminarla. Todas las funciones del sistema, como administrador, coordinador, histotécnico y patólogo, tienen carácter permanente y no se pueden eliminar.

 Para poder eliminar una función que haya creado un administrador, la lista de usuarios asociados a ella debe estar vacía.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- Ha iniciado sesión en uPath software con las credenciales de administrador.


► Para eliminar una función

1 Seleccione **User Settings > Data Management > Roles**.

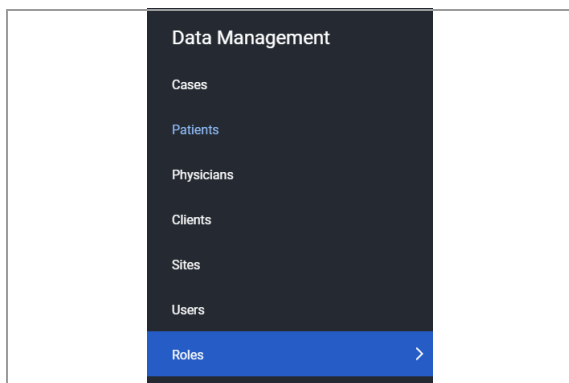

2 Seleccione la función que desea eliminar.

- ❶ Las funciones que ha creado un administrador se muestran en fuente de color negro y las funciones permanentes de uPath software aparecen en fuente de color verde.

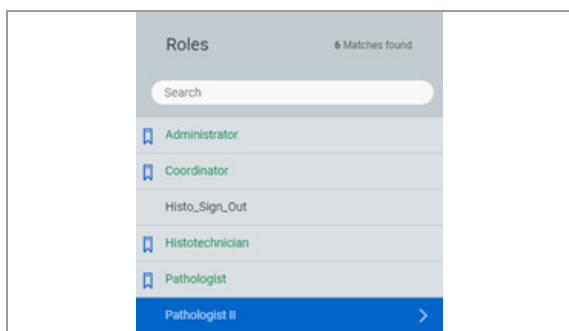


3 En la parte inferior de la lista **Roles**, seleccione el botón **Delete**.

- ❶ Una función eliminada NO SE PUEDE recuperar.
- Se muestra una notificación azul que le indica que confirme la eliminación.



- 4 Para confirmar la eliminación, seleccione el botón **Yes**.
 - ❶ Para cancelar la eliminación de la función, seleccione el botón **No**.
 - Si selecciona **Yes**, se mostrará una notificación en banner verde que confirma la correcta eliminación de la función. La función deja de aparecer en el panel **Roles**.

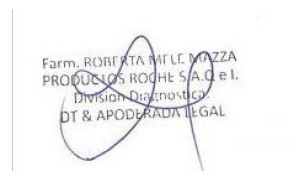

Tareas del histotécnico en la gestión de datos

Contenidos de esta sección



- Acerca de las solicitudes de portaobjetos (334)
- Adición de portaobjetos o de un patólogo a un caso (334)
- Visualización de solicitudes de portaobjetos (336)
- Eliminación de solicitudes de portaobjetos (337)
- Realización de solicitudes de portaobjetos (338)

Acerca de las solicitudes de portaobjetos

En la pantalla [Data Management > Requests](#) puede visualizar y rellenar todas las solicitudes de portaobjetos del patólogo.

Los patólogos crean solicitudes de portaobjetos con los siguientes métodos:

- Con la opción de solicitud para pedir portaobjetos adicionales del caso.
- Con el rechazo del portaobjetos por un problema de calidad para que uPath software genere de forma automática una solicitud de portaobjetos.

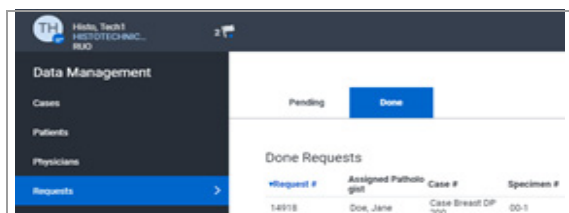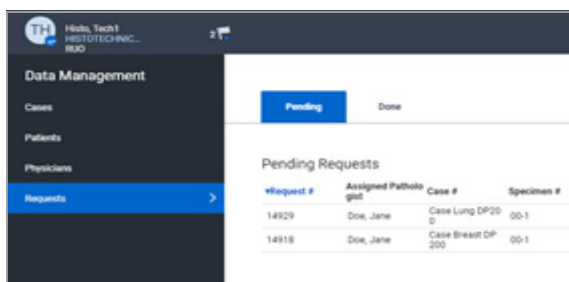


Después de que haya completado una solicitud de portaobjetos, la solicitud pasa de la lista [Pending Requests](#) a la lista [Done Requests](#).

Temas relacionados

- Descripción general del software (27)
- Acerca de la gestión de datos para los histotécnicos (295)

Adición de portaobjetos o de un patólogo a un caso

Es posible que necesite revisar casos cuyo estado sea Pending y, a continuación, añadir portaobjetos nuevos o repetir el escaneado de los portaobjetos de un caso. También es posible que haya casos que requieran una asignación del patólogo.

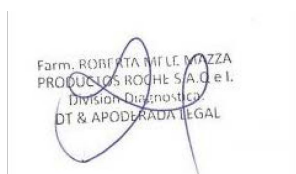

Revise las listas de casos según sea necesario.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla Data Management está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de histotécnico y los permisos correctos.

► **Revisión del estado de los casos**

1 Seleccione **User Settings > uPath > CASES**.

→ Se muestra la tabla **ALL ACTIVE CASES**.

💡 Es una pantalla de trabajo para el patólogo, con una funcionalidad limitada para el histotécnico. En la barra de menú superior, solo está disponible el botón **Search**.

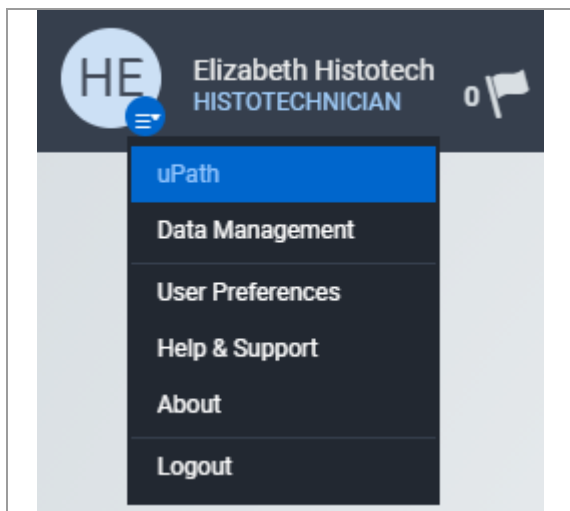


Tissue Type	Assigned Pathologist	Attachment	Referring Physician	Treating Physician	Slides	Case Status
Breast					0	Pending
Lung	SUSAN, M...				3	In-Progress

2 Ordene la tabla **ALL ACTIVE CASES** para facilitar su revisión. Seleccione el encabezado de la columna para ordenar la columna.

🕒 El triángulo indica que el orden de clasificación es ascendente o descendente.

3 Observe los números de casos con estado Pending que tienen 0 portaobjetos o el campo de asignación del patólogo que esté vacío.

4 Seleccione **User Settings > Data Management > Cases**. Seleccione un caso que requiera portaobjetos o una asignación del patólogo.

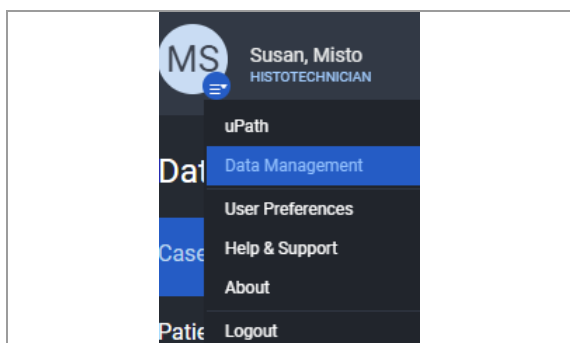

Workflow Information

Case Workflow *
 Integrated View (Treating MD) ▼

Client Name
 Search

Referring Physician
 Search

Treating Physician
 Search

Assigned Pathologist
 Search

Slide Information (+) New

*Slide # ... Block # ... *Test Type ... *Control

Slide List

*Slide #	Block #	Test Type	Control	Image
00-1		HER2 DUAL...	None	VT_AUR-0
00-2		ER		

Slide Image
 VT_AUR-013_JSH

5 En el campo **Assigned Pathologist** de la sección **Workflow Information**, comience a escribir para ver una lista de las opciones disponibles. Seleccione una opción de la lista.

→ Solo los patólogos relevantes para el flujo de trabajo y los permisos configurados estarán disponibles en la lista **Assigned Pathologist**.

💡 Para que un caso se pueda cerrar, este debe estar asignado a un patólogo. Sin embargo, puede asignar el patólogo más adelante.

6 En la sección **Slide Information**, en la parte superior derecha, seleccione el botón **Associate Slide Images**.

→ Se muestra el cuadro de diálogo **Associate Slide Images**. La información sobre el portaobjetos se encuentra en el lateral izquierdo y las imágenes del portaobjetos en miniatura quedan disponibles en el lateral derecho.

7 Busque la ubicación de la imagen en miniatura del portaobjetos en el lateral derecho y arrástrela al campo Image. Repita este procedimiento para asociar una imagen en miniatura a cada portaobjetos.

8 Seleccione el botón **SAVE**.

Visualización de solicitudes de portaobjetos

Puede visualizar las solicitudes de portaobjetos enviadas por los patólogos.



Revise las solicitudes de portaobjetos según sea necesario.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **Data Management** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignados la función y los permisos correctos.

► Para visualizar solicitudes de portaobjetos

1 Seleccione la pestaña **Data Management > Requests > Pending**.

→ Se muestra la tabla Pending Requests.

Request #	Assigned Pathologist	Case #	Specimen #	Slide Id	Elapsed Time	Test Type	Request Reason	Comments	Status
2826	Matho, Susan	12340	00-1	Breast Case 1 Ki67 DP20 0	4d 12h 14m	ER	Slide Request		Pending
2623	Matho, Susan	12340	00-1	Breast Case 1 Ki67 DP20 0	4d 14h 30m	H&E	Rescan	SLIDE COMMENT Need additional slide to confirm.	Pending
2611	Matho, Susan	12340	00-1	Breast Case 1 Ki67 DP20 0	4d 14h 32m	H&E	Rescan		Pending
2600	Matho, Susan	12340	00-1	Breast Case 1 Ki67 DP20 0	4d 14h 41m	H&E	Rescan Request		Pending

2 En la tabla **Pending Requests**, revise los detalles de la solicitud del portaobjetos, como **Case#**, **Specimen #**, **Slide id**, **Request Reason** y los comentarios del patólogo.

- Solicite la repetición de escaneados o nuevos portaobjetos en función del motivo de solicitud del patólogo.

Temas relacionados

- Realización de solicitudes de portaobjetos (338)

Eliminación de solicitudes de portaobjetos


Puede eliminar una solicitud de portaobjetos y eliminarla de la pestaña **Pending** en Data Management.



Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.

- La pantalla **Data Management** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de histotécnico y los permisos correctos.

Farm. ROBERTA MITTE MAZZA
PRODUCIOS ROCHE S.A. Q.e.l.
Division Diagnostico
DT & APODERADA LEGAL

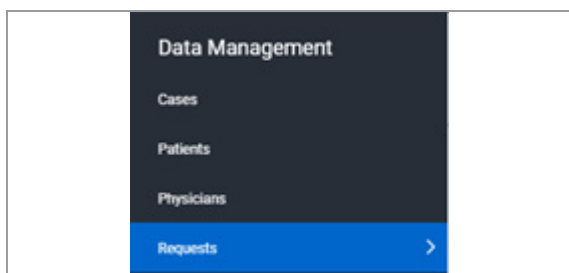

Request Reason	Comments	Status
Slide Request		Pending
Rescan Request		Pending
Rescan Request		Completed
Rescan Request		Canceled
Rescan Request		Excluded

► Para eliminar una solicitud de portaobjetos

1 Seleccione la pestaña **Data Management > Requests > Pending**.

→ Se muestra la tabla Pending Requests.

2 Para cancelar una solicitud de portaobjetos:

- En la columna **Status**, seleccione **Canceled** de la lista y, a continuación, seleccione el botón **SAVE**.

→ La solicitud se elimina de la tabla **Pending Requests**.

→ El **CASE LOG** indica que la solicitud se ha anulado (la solicitud está tachada), y que la plantilla de portaobjetos que indica una solicitud se ha eliminado de la pantalla **VIEWER** del patólogo.

Realización de solicitudes de portaobjetos

Después de que haya revisado una solicitud de portaobjetos, puede programar la repetición de escaneados de portaobjetos requeridos o solicitar nuevos portaobjetos en función de la solicitud del patólogo.



- Recupere portaobjetos del inventario para realizar una repetición del escaneado.
- Solicite nuevos portaobjetos.




Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas antes de iniciar este procedimiento.


- La pantalla **Data Management** está abierta.
- Antes de llevar a cabo esta tarea, debe tener asignada la función de histotécnico y los permisos correctos.
- Tenga disponible el número del caso de la solicitud de portaobjetos Pending.

Farm. ROBERTA MILE MAZZA
 PRODUTOS ROCHE S.A. Q. e. l.
 División Diagnóstico
 DT & APODERADA LEGAL


► Para completar solicitudes de portaobjetos

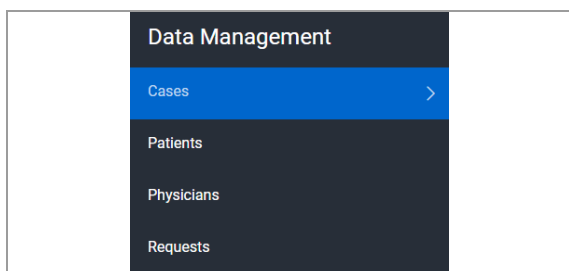

- 1 Seleccione **Data Management > Cases > Case List** y, a continuación, seleccione el caso con la solicitud del portaobjetos.

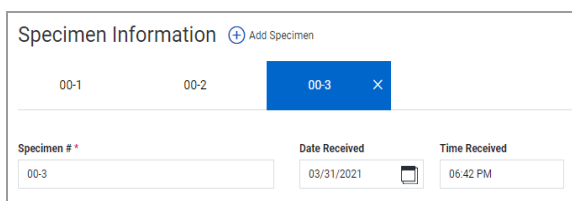


- 2 En la sección **Specimen Information**, seleccione la pestaña de la muestra utilizada para la repetición de escaneados o los nuevos portaobjetos.

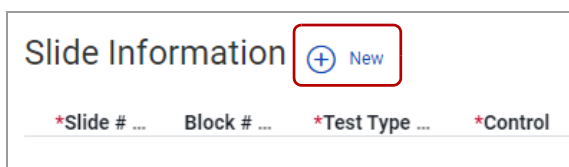


- 3 En la sección **Slide Information**, seleccione el botón **New** para crear una nueva entrada de información del portaobjetos de cada repetición de escaneado o portaobjetos nuevo.
 - ❶ Puede sustituir la imagen para una entrada de portaobjetos existente. Sin embargo, si hace esto, se eliminarán todos los datos asociados con el portaobjetos, incluidos los resultados de análisis.



Slide #*	Block #	Test Type *	Control*
00-1		P53	None
00-2		HNE	None
00-3		ER	None

- 4 Edite cada entrada **Slide Information** de forma que el **Test Type** sea correcto en función de la solicitud.

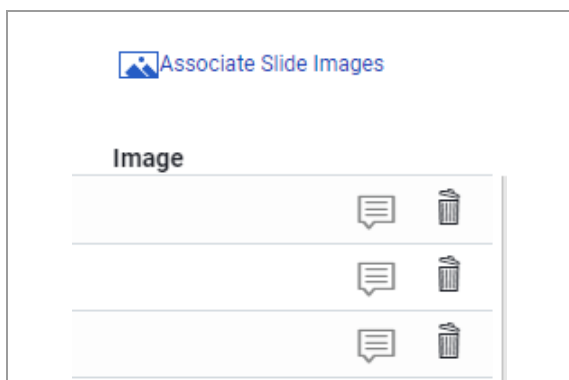

- 5 Seleccione el botón **Associate Slide Images**.
 - Se muestra el cuadro de diálogo **Associate Slide Images**.

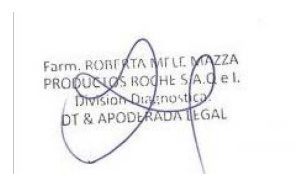

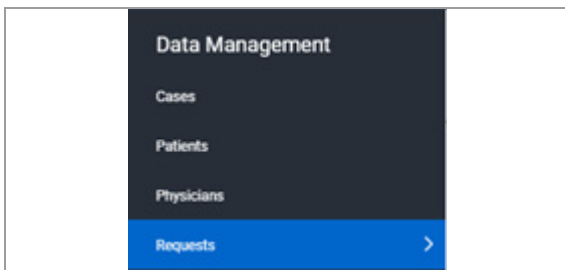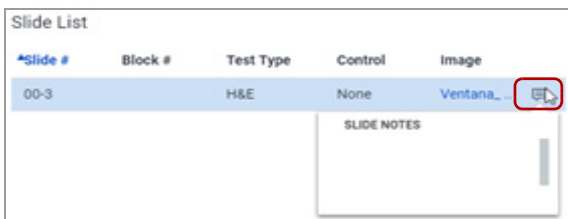

Request Reason	Comments	Status
Slide Request		Pending
Rescan Request		Pending
Rescan Request		Completed
Rescan Request		Canceled
Rescan Request		Excluded

6 Seleccione la imagen del portaobjetos y arrástrela hacia el campo **Image**.

7 (opcional) Seleccione el icono de detalles situado en la tabla de portaobjetos y añada una nota del portaobjetos.

8 Seleccione el botón **SAVE**.
→ Se muestra **Case List**.

9 En **Case List**, seleccione el botón **SAVE**.
→ NOTA: Si ha seleccionado **SAVE** y había entradas en la tabla **Slide Information** con nuevos portaobjetos que se subieron para sustituir los portaobjetos existentes, una notificación en banner azul le advierte que se perderán todos los datos relacionados con los portaobjetos antiguos.

10 Seleccione **OK** para continuar, o **CANCEL** para descartar los cambios.

11 En el panel Data Management, seleccione la opción **Requests**.

12 En la columna **Status**, cambie el estado de Pending a Completed.

13 Seleccione el botón **SAVE**.

→ La solicitud pasa de la tabla de Pending Requests a la de Done Requests.

14 En la ventana Requests, seleccione la pestaña **Done** para ver las solicitudes completadas.

● Puede volver a pasar las solicitudes completadas de la pestaña **Done Requests** a la tabla **Pending Requests** seleccionando Pending en la columna **Status** y haciendo clic, a continuación, en el botón **SAVE**.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: PRODUCTOS ROCHE S.A. RÓTULOS E INSTRUCCIONES DE USO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 340 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.09.28 09:11:10 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.09.28 09:11:14 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-004776-22-5

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN
PRODUCTO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO**

Expediente N° 1-0047-3110-004776-22-5

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

Nombre Comercial: 1) NAVIFY Digital Pathology (uPath cloud); 2) uPath.

Indicación/es de uso:

1-2) El uPath enterprise software (o NAVIFY Digital Pathology) está destinado a la interacción de los usuarios con imágenes digitalizadas de portaobjetos de vidrio a través de las siguientes funcionalidades:

- a. Visualización, gestión e intercambio de imágenes digitalizadas de portaobjetos de vidrio.
- b. Importación de información del Sistema de información de laboratorio (LIS).
- c. Exportación de información al LIS.
- d. Uso como plataforma de algoritmos de análisis de imágenes.

Forma de presentación: No aplica.

Período de vida útil: No aplica.

Nombre del fabricante:

Ventana Medical Systems, Inc.

Lugar de elaboración:

Ventana Medical Systems, Inc. 1910 East Innovation Park Drive. Tucson, Arizona 85755. (USA).

Grupo de Riesgo: Grupo C

Condición de uso: Uso profesional exclusivo

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PRODUCTO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PM 740-823 , con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-004776-22-5

N° Identificador Trámite: 40716

AM