



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-002922-22-6

---

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-002922-22-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones MEDSURGICAL ARGENTINA S.A solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

## DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca VLift PRO nombre descriptivo Sutura Esteril de Polidioxanona Con Aguja y nombre técnico „Sutura Esteril de Polidioxanona Con Aguja , de acuerdo con lo solicitado por MEDSURGICAL ARGENTINA S.A , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2022-124208948-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 1759-36 ”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

## DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1759-36

Nombre descriptivo: Sutura Esteril de Polidioxanona Con Aguja

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
16-584 Sutura Esteril de Polidioxanona Con Aguja

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): VLift PRO

Modelos:

1. YRPN18-.151 Sutura PDO COG con aguja curva "C"  
despuntada

2. YRPN25-111 Sutura PDO COG con aguja general
3. YRPN25-113 Sutura PDO COG con aguja general
4. YRPN19-103-L Sutura PDO COG con aguja general L despuntada
5. YRPN19-104-L Sutura PDO COG con aguja general "L" despuntada
6. YRPN21-58-L Sutura PDO COG con aguja general "L" despuntada
7. YRPN19-94-G Sutura PDO COG con aguja grip
8. YRPN19-95-G Sutura PDO COG con aguja grip
9. YRPN21-95-G Sutura PDO COG con aguja grip
10. YRPN21-80-G Sutura PDO COG con aguja grip
11. YRPN23-79-G Sutura PDO COG con aguja grip
12. YRPN23-80-G Sutura PDO COG con aguja grip
13. YRPN27-06-G Sutura PDO COG con aguja grip
14. YRPN27-80-G Sutura PDO COG con aguja grip
15. YRPN27-10-G Sutura PDO COG con aguja grip
16. YRPN18-126-LG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
17. YRPN19-94-LG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
18. YRPN19-95 Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
19. YRPN21-79 Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
20. YRPN21-80-LG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
21. YRPN23-79-LG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
22. YRPN23-80 Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
23. YRPN18-120-LG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
24. YRPN18-150-CG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
25. YRPN19-126-LG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
26. YRPN19-147-CG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
27. YRPN19-94-WG Sutura PDO COG con aguja grip "W" despuntada
28. YRPN19-95-WG Sutura PDO COG con aguja grip "W" despuntada
29. YRPN21-79-WG Sutura PDO COG con aguja grip "W" despuntada
30. YRPN21-80-WG Sutura PDO COG con aguja grip "W"

despuntada

31. YRPN23-79-WG Sutura PDO COG con aguja grip "W"

despuntada

32. YRPN23-80-WG Sutura PDO COG con aguja grip "W"

despuntada

33. YRDN-FE-CI-02 Sutura PDO COG con aguja recta

34. YRDN-SC-CI-01 Sutura PDO COG con aguja recta

35. YRDN-SC-CI-02 Sutura PDO COG con aguja recta

36. YRN30-01-W Sutura general PDO con aguja general "W"

despuntada

37. YRN25-03-G Sutura general PDO con aguja grip

38. YRN25-05-G Sutura general PDO con aguja grip

39. YRN26-01-G Sutura general PDO con aguja grip

40. YRS26-02-G Sutura general PDO con aguja grip

41. YRS25-03-G Sutura general PDO con aguja grip

42. YRCF25-02-G Sutura general PDO con aguja grip

43. YRCF27-02-G Sutura general PDO con aguja grip

44. YRCF29-02-G Sutura general PDO con aguja grip

45. YRDS25-02-G Sutura general PDO con aguja grip

46. YRDS25-03-G Sutura general PDO con aguja grip

47. YRDS26-01 -G Sutura general PDO con aguja grip

48. YRDS26-02-G Sutura general PDO con aguja grip

49. YRDS25-03-G Sutura general PDO con aguja grip

50. YRDS26-05-G Sutura general PDO con aguja grip

51. YRN25-02-G Sutura general PDO con aguja grip

52. YRN26-02-G Sutura general PDO con aguja grip

53. YRN26-03-G Sutura general PDO con aguja grip

54. YRN26-05-G Sutura general PDO con aguja grip

55. YRN27-01-G Sutura general PDO con aguja grip

56. YRN27-02-G Sutura general PDO con aguja grip

57. YRN27-03-G Sutura general PDO con aguja grip

58. YRN29-01-G Sutura general PDO con aguja grip

59. YRN27-02-G Sutura general PDO con aguja grip

60. YRN27-03-G Sutura general PDO con aguja grip

61. YRN29-04-G Sutura general PDO con aguja grip

62. YRN30-01-G Sutura general PDO con aguja grip

63. YRN30-02-G Sutura general PDO con aguja grip

64. YRS25-03-G Sutura general PDO con aguja grip

65. YRS27-02-G Sutura general PDO con aguja grip

66. YRS29-01-G Sutura general PDO con aguja grip

67. YRS29-02-G Sutura general PDO con aguja grip

68. YRS29-03-G Sutura general PDO con aguja grip

69. YRS29-04-G Sutura general PDO con aguja grip

70. YRS30-02-G Sutura general PDO con aguja grip

71. YRCF23-06-LG Sutura general PDO con aguja grip

"L" despuntada

72. YRCF23-07-LG Sutura general PDO con aguja grip  
"L" despuntada  
73. YRMF23-01-LG Sutura general PDO con aguja grip  
"L" despuntada  
74. YRMF23-03-LG Sutura general PDO con aguja grip  
"

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Fijación del tejido subdérmico superficial en cirugía plástica y reconstructiva.

La sutura estéril de polidioxanona con aguja favorece el soporte a las heridas por un periodo de tiempo más largo comparado con otras suturas sintéticas reabsorbibles. También prolonga el periodo de estimulación, favoreciendo el efecto del tratamiento en el cuerpo

Período de vida útil: 2 años a partir de la fecha de esterilización

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No corresponde

Forma de presentación: Envase secundario conteniendo 50 unidades subdividido en 2 sub unidades de 25 suturas cada una

Método de esterilización: Oxido de etileno

Nombre del fabricante:

Yurim Medical Co., Ltd

Lugar de elaboración:

43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,  
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea). OREA, Chungcheongbuk-do –  
COREA, REPUBLICA DEMOCRATICA / DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF KOREA

N° 1-0047-3110-002922-22-6

N° Identificador Trámite: 39040

AM

Digitally signed by GARAY Valéria Teresa  
Date: 2022.11.28 09:31:33 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.11.28 09:31:39 -03:00

<b>MEDSURGICAL S.A</b>	<b>ANEXO III.B</b>	Página 1 de 6
	<b>Proyecto de Rótulos E Instrucciones de uso</b>	

Rótulos:

V L1FT PRO, SUTURA ESTERIL DE POLIDIOXANONA CON AGUJA

Fabricado por:

1) Yurim Medical Co., Ltd.

43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,  
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea). KOREA, Chungcheongbuk-do –  
COREA,

REPUBLICA DEMOCRATICA / DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF KOREA

Importador:

MEDSURGICAL ARGENTINA S.A.

Av. presidente Julio A. Roca 751, piso 5°, UF 24, dpto. B,  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: (54-911) 54551833

Fax: (54-911) 54551833

Sutura estéril de polidioxanona con aguja Modelo:

Tamaño/ Largo I Calibre:

N° Lote:

Fecha de fabricación:

Vencimiento:

Producto estéril.

Esterilizado por método de óxido de etileno

Producto de un solo uso, No reutilizar

No Re esterilizar

No utilizar si el envase se encuentra dañado

Condiciones de almacenamiento:

1. Mantener el producto en un lugar limpio y seco
2. Evitar luz solar directa y alta humedad.

**Verifique las Instrucciones de uso con el folleto adjunto.**

Fecha de caducidad: 2 años

DT: Gladys Liliana Fabrizio – M.N.9843

Uso exclusivo a profesionales e Instituciones Sanitarias

**Autorizado por la ANMAT PM 1759-36**



<b>MEDSURGICAL S.A</b>	<b>ANEXO III.B</b>	Página 2 de 6
	<b>Proyecto de Rótulos E Instrucciones de uso</b>	

**Instrucciones de uso:**

**Elaborado por:**

Yurim Medical Co., Ltd.

43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,  
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea. KOREA, Chungcheongbuk-do –  
COREA,

REPUBLICA DEMOCRATICA / DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF KOREA

**Importador:**

MEDSURGICAL ARGENTINA S.A.

Av. Presidente Julio A. Roca 751, piso 5°, UF 24, DPTO B,  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: (54-911) 54551833

Fax: (54-911) 54551833

Sutura estéril de polidioxanona con aguja  
Producto estéril por el método de Óxido de etileno

Un solo uso, No reutilizar

No re-esterilizar

No utilizar si el envase se encuentra dañado

Modelo:

Tamaño/ Largo I Calibre:

N° Lote:

Fecha de fabricación:

Vencimiento:

  
GLADYS L. FABRIZIO  
FARMACEUTICA  
MATRICULA N° 9049

  
JESICA T. MUSACCHIO  
MEDSURGICAL S.A.  
PRESIDENTE

<b>MEDSURGICAL S.A</b>	<b>ANEXO III.B</b>	Página 3 de 6
	<b>Proyecto de Rótulos E Instrucciones de uso</b>	

Condiciones de almacenamiento:

1. Mantener el producto en un lugar limpio y seco
2. Evitar luz solar directa y alta humedad.

"Uso exclusivo para profesionales e instituciones sanitarias"

Indicaciones:

Fijación del tejido subdérmico superficial en cirugía plástica y reconstructiva.

La sutura estéril de polídióxanona con aguja favorece el soporte a las heridas por un periodo de tiempo más largo, comparado con otras suturas sintéticas reabsorbibles.

También prolonga el periodo de estimulación, favoreciendo el efecto del tratamiento en el cuerpo.

Características del dispositivo:

La sutura estéril de polídióxanona con aguja está formada por aguja, capuchón de la aguja, cono, esponja y sutura de polidioxanona (PDO). Esterilizada por EO gas.

La seguridad y la efectividad de la polidioxanona (PDO) está probada. La polídióxanona (PDO) utilizada en este dispositivo es una sutura absorbible que ya ha sido utilizada para el cuidado de heridas desde 2001.

  
GLADYS L. FABRIZIO  
FARMACEUTICA  
MATRICULA N° 9049

  
JESICA T. MUSACCHIO  
MEDSURGICAL S.A.  
PRESIDENTE

<b>MEDSURGICAL S.A</b>	<b>ANEXO III.B</b>	Página 4 de 6
	<b>Proyecto de Rótulos E Instrucciones de uso</b>	

Antes del uso:

1. Se requiere un buen estado general del paciente antes de la utilización de este producto
2. Desinfectar el área de tratamiento, por ejemplo, con algodón empapado en alcohol.
3. Dispositivo estéril de un solo uso
4. Comprobar que el modelo es el correcto
5. Comprobar la fecha caducidad
6. Comprobar que el empaquetado no esté dañado.

**7. Usar solo después de haber entendido completamente las instrucciones**

Instrucciones de uso:

1. Compruebe el contenido y el acondicionamiento del embalaje
2. Asegúrese de conocer las instrucciones de uso
3. Use el producto sólo si no está dañado y el empaquetado es estéril
4. Retire el embalaje del producto y extraiga cuidadosamente la sutura estéril de polidioxanona con aguja.
5. Confirme la integridad del producto
6. Desinfecte las áreas de tratamiento
7. Inserte la aguja por debajo de la piel o músculo a ser tratado
8. Retire suavemente la aguja del área tratada

Después del uso:

1. Desechar el producto una vez abierto
2. Este producto es de uso único
3. Desechar el producto usado en un lugar seguro

  
GLADYS L. FABRIZIO  
FARMACEUTICA  
MATRICULA N° 9045

  
JESICA T. MUSACCHIO  
MEDSURGICAL S.A.  
PRESIDENTE

<b>MEDSURGICAL S.A</b>	<b>ANEXO III.B</b>	Página 5 de 6
	<b>Proyecto de Rótulos E Instrucciones de uso</b>	

#### Caducidad

2 años a partir de la fecha de esterilización

#### Advertencias

Pacientes que no debería usar las suturas:

1. Pacientes con mala nutrición
2. Pacientes debilitados
3. Pacientes con formación de cicatrices hipertróficas
4. Pacientes tratados con anticoagulantes O inhibidores de la agregación de trombocitos (p. ej. ASS)
5. Pacientes con áreas cutáneas infectadas o inflamadas
6. Pacientes con enfermedades autoinmunes que están recibiendo una inmunoterapia
7. Pacientes con sensibilidad conocida a la polidioxanona
8. Mujeres embarazadas y lactantes
9. Pacientes menores de 18 años

#### Efectos secundarios

Generalmente, las suturas de PDO se toleran muy bien, muy raramente pueden ocurrir reacciones cutáneas inducidas por la inyección tales como dolor ligero, sensación de tensión y presión, escozor, picazón, hematoma o hinchazón ligera. Estas reacciones se alivian después de un corto periodo de tiempo

#### Precauciones

1. Este producto debe ser usado por los médicos
2. No usar después de la fecha de caducidad
3. No usar si el envoltorio está dañado
4. Producto sanitario. No dar otro uso
5. Si el área a tratar está inflamada o infectada, el producto no debe usarse



GLADYS L. FABRIZIO  
FARMACEUTICA  
MATRICULA N° 9045



JESICA T. MUSACCHIO  
MEDSURGICAL S.A.  
PRESIDENTE

<b>MEDSURGICAL S.A</b>	<b>ANEXO III.B</b>	Página 6 de 6
	<b>Proyecto de Rótulos E Instrucciones de uso</b>	

#### Modo de conservación

1. Mantener el producto en un lugar limpio y seco
2. Evitar luz solar directa y alta humedad

#### Contraindicaciones

Si el paciente sufre de trastorno cardiaco, presión arterial alta, diabetes, trastorno de pánico, depresión, etc., tiene que haber un análisis más profundo con el médico.

Tratamiento contraindicado en pacientes con cualquier tipo de inflamación aguda, sensibilidad o alergia previa al componente.

Mantener especial atención en pacientes que sufren cualquier tipo de enfermedad autoinmune, así como en pacientes anticoagulados.

#### Prohibiciones

1. Antes de la operación, durante aproximadamente una semana, dejar de tomar anticoagulantes (por ejemplo, Aspirina, Marcumar)
2. Antes y después de la operación, dejar de fumar y beber
3. Las enfermedades imprevistas como el resfriado o la fiebre pueden causar problemas con la anestesia; el médico tratante debe ser informado sobre tales enfermedades.



GLADYS L. FABRIZIO  
FARMACEUTICA  
MATRICULA N° 9049



JESICA T. MUSACCHIO  
MEDSURGICAL S.A.  
PRESIDENTE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** MEDSURGICAL ARGENTINA S.A. rótulos e instrucciones de uso

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.11.17 09:10:43 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.11.17 09:10:44 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-002922-22-6

---

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente N° 1-0047-3110-002922-22-6

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por MEDSURGICAL ARGENTINA S.A ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

**DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 1759-36

Nombre descriptivo: Sutura Esteril de Polidioxanona Con Aguja

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
16-584 Sutura Esteril de Polidioxanona Con Aguja

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): VLift PRO

Modelos:

1. YRPN18-.151 Sutura PDO COG con aguja curva "C" despuntada
2. YRPN25-111 Sutura PDO COG con aguja general

3. YRPN25-113 Sutura PDO COG con aguja general
4. YRPN19-103-L Sutura PDO COG con aguja general L despuntada
5. YRPN19-104-L Sutura PDO COG con aguja general "L" despuntada
6. YRPN21-58-L Sutura PDO COG con aguja general "L" despuntada
7. YRPN19-94-G Sutura PDO COG con aguja grip
8. YRPN19-95-G Sutura PDO COG con aguja grip
9. YRPN21-95-G Sutura PDO COG con aguja grip
10. YRPN21-80-G Sutura PDO COG con aguja grip
11. YRPN23-79-G Sutura PDO COG con aguja grip
12. YRPN23-80-G Sutura PDO COG con aguja grip
13. YRPN27-06-G Sutura PDO COG con aguja grip
14. YRPN27-80-G Sutura PDO COG con aguja grip
15. YRPN27-10-G Sutura PDO COG con aguja grip
16. YRPN18-126-LG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
17. YRPN19-94-LG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
18. YRPN19-95 Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
19. YRPN21-79 Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
20. YRPN21-80-LG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
21. YRPN23-79-LG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
22. YRPN23-80 Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
23. YRPN18-120-LG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
24. YRPN18-150-CG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
25. YRPN19-126-LG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
26. YRPN19-147-CG Sutura PDO COG con aguja grip "L" despuntada
27. YRPN19-94-WG Sutura PDO COG con aguja grip "W" despuntada
28. YRPN19-95-WG Sutura PDO COG con aguja grip "W" despuntada
29. YRPN21-79-WG Sutura PDO COG con aguja grip "W" despuntada
30. YRPN21-80-WG Sutura PDO COG con aguja grip "W" despuntada

31. YRPN23-79-WG Sutura PDO COG con aguja grip "W" despuntada
32. YRPN23-80-WG Sutura PDO COG con aguja grip "W" despuntada
33. YRDN-FE-CI-02 Sutura PDO COG con aguja recta
34. YRDN-SC-CI-01 Sutura PDO COG con aguja recta
35. YRDN-SC-CI-02 Sutura PDO COG con aguja recta
36. YRN30-01-W Sutura general PDO con aguja general "W" despuntada
37. YRN25-03-G Sutura general PDO con aguja grip
38. YRN25-05-G Sutura general PDO con aguja grip
39. YRN26-01-G Sutura general PDO con aguja grip
40. YRS26-02-G Sutura general PDO con aguja grip
41. YRS25-03-G Sutura general PDO con aguja grip
42. YRCF25-02-G Sutura general PDO con aguja grip
43. YRCF27-02-G Sutura general PDO con aguja grip
44. YRCF29-02-G Sutura general PDO con aguja grip
45. YRDS25-02-G Sutura general PDO con aguja grip
46. YRDS25-03-G Sutura general PDO con aguja grip
47. YRDS26-01 -G Sutura general PDO con aguja grip
48. YRDS26-02-G Sutura general PDO con aguja grip
49. YRDS25-03-G Sutura general PDO con aguja grip
50. YRDS26-05-G Sutura general PDO con aguja grip
51. YRN25-02-G Sutura general PDO con aguja grip
52. YRN26-02-G Sutura general PDO con aguja grip
53. YRN26-03-G Sutura general PDO con aguja grip
54. YRN26-05-G Sutura general PDO con aguja grip
55. YRN27-01-G Sutura general PDO con aguja grip
56. YRN27-02-G Sutura general PDO con aguja grip
57. YRN27-03-G Sutura general PDO con aguja grip
58. YRN29-01-G Sutura general PDO con aguja grip
59. YRN27-02-G Sutura general PDO con aguja grip
60. YRN27-03-G Sutura general PDO con aguja grip
61. YRN29-04-G Sutura general PDO con aguja grip
62. YRN30-01-G Sutura general PDO con aguja grip
63. YRN30-02-G Sutura general PDO con aguja grip
64. YRS25-03-G Sutura general PDO con aguja grip
65. YRS27-02-G Sutura general PDO con aguja grip
66. YRS29-01-G Sutura general PDO con aguja grip
67. YRS29-02-G Sutura general PDO con aguja grip
68. YRS29-03-G Sutura general PDO con aguja grip
69. YRS29-04-G Sutura general PDO con aguja grip
70. YRS30-02-G Sutura general PDO con aguja grip
71. YRCF23-06-LG Sutura general PDO con aguja grip "L" despuntada
72. YRCF23-07-LG Sutura general PDO con aguja grip

"L" despuntada

73. YRMF23-01-LG Sutura general PDO con aguja grip

"L" despuntada

74. YRMF23-03-LG Sutura general PDO con aguja grip

"

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Fijación del tejido subdérmico superficial en cirugía plástica y reconstructiva.

La sutura estéril de polidioxanona con aguja favorece el soporte a las heridas por un periodo de tiempo más largo comparado con otras suturas sintéticas reabsorbibles. También prolonga el periodo de estimulación, favoreciendo el efecto del tratamiento en el cuerpo

Período de vida útil: 2 años a partir de la fecha de esterilización

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No corresponde

Forma de presentación: Envase secundario conteniendo 50 unidades subdividido en 2 sub unidades de 25 suturas cada una

Método de esterilización: Oxido de etileno

Nombre del fabricante:

Yurim Medical Co., Ltd

Lugar de elaboración:

43, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do, Republic of Korea). OREA, Chungcheongbuk-do –

COREA, REPUBLICA DEMOCRATICA / DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF KOREA

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1759-36 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-002922-22-6

N° Identificador Trámite: 39040

AM

Digitally signed by Gestion Documental Electronica

Date: 2022.11.23 19:35:02 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica

Date: 2022.11.23 19:35:02 -03:00