



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° **11119**

BUENOS AIRES, **07 OCT 2016**

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-2446-16-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC, solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1842-156, denominado: Bioprótesis cardíaca y accesorios, marca: Medtronic.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1842-156, denominado: Bioprótesis cardíaca y accesorios, marca: Medtronic.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° = 1 1 1 1 9

ARTÍCULO 2º.- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1842-156.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición y conjuntamente con su Anexo e Instrucciones de Uso; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-2446-16-7

DISPOSICIÓN N°

MAB

1 1 1 1 9


Dr. ROBERTO LEDESMA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **11119**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1842-156 y de acuerdo a lo solicitado por la firma MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC, la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre descriptivo: Bioprótesis cardíaca y accesorios.

Nombre comercial: Medtronic.

Clase: IV

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 8457/15

Tramitado por expediente N° 1-47-3110-2446-14-3

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Instrucciones de Uso	Aprobados por Disposición ANMAT N° 8457/15.	A fs. 77 a 91.

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC. Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1842-156, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **07 OCT 2016**

Expediente N° 1-47-3110-2446-16-7

DISPOSICIÓN N°

11119

Dr. ROBERTO MEDES
Subadministrador Nacional
ANMAT

-11119

07 OCT 2016



ANEXO III B - INSTRUCCIONES DE USO

Fabricado por Medtronic Inc

710 Medtronic Pkwy. Minneapolis, MN 55432, Estados Unidos

Medtronic Heart Valves Division

1851 EAST DEERE AVE. Santa Ana, CA 92705, Estados Unidos

Importado por MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

Domicilio fiscal/comercial: Vedia 3616, 2º Piso, C. A. B. A

Tel. +54-11-5297 7200

Deposito: Rio Limay 1965, C. A. B. A.

Medtronic

Bioprótesis Aórtica

Mosaic, Bioprótesis (Aórtica) - Modelo 305

Mosaic ULTRA, Bioprótesis (Aórtica) - Modelo 305

Mosaic, Bioprótesis (Mitral) - Modelo 310

Accesorios:

Mosaic CINCH, Probadores Aórticos - Modelo 7308C

Mosaic ULTRA, Probadores Aórticos - Modelo 7308U

Mosaic, Obturador Mitral - Modelo 7310

Mosaic Ultra & Hancock II Ultra, Probadores Supra-X, Probador (Supra-anular) Modelo 7305UX

Medtronic, Asa p/Válvula - Modelo 7639

Medtronic, Tuerca p/Cierre - Modelo 7642

CONDICION DE VENTA: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045


AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-156

DESCRIPCIÓN

Las bioprótesis Mosaic™, Modelo 305 (aórtico) y Modelo 310 (mitral), constan de válvulas aórticas porcinas conservadas en una solución de glutaraldehído al 0,2 % tamponada, y adaptadas y fijadas a stents flexibles recubiertos de tejido. La fijación del tejido con una solución de glutaraldehído al 0,2 % tamponada produce una válvula porcina prácticamente no antígena. El proceso de reticulación del tejido de la raíz aórtica porcina se realiza aplicando presión hidrostática a la raíz mientras se mantiene una presión diferencial de cero en las valvas de la válvula.

ANDREA RODRIGUEZ
Directora Técnica
M.N. 14045 - M.P. 17090
Representante Legal
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

101119

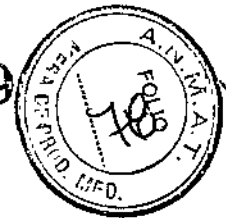

El tejido está tratado con un proceso de antimineralización con ácido alfa-amino-oleico, AOA™, que ha demostrado reducir la calcificación de las valvas porcinas en estudios realizados en animales.

Los stents de las válvulas aórtica y mitral están fabricados con material polimérico.

Las bioprótesis Mosaic se encuentran disponibles en los tamaños y diámetros de anillos de sutura que se muestran de la Tabla 1 a la Tabla 3.

Las características de tracto de entrada de las válvula aórtica y mitral son parecidas a la anatomía natural de los anillos. El stent y el anillo de sutura de la válvula aórtica están festoneados. El stent y el anillo de sutura de la válvula mitral son planos.


Los stents disponen de marcadores metálicos en las patas del stent para permitir la visualización radiográfica. Los marcadores están situados cerca del vértice de cada pata del stent para permitir la visualización de la relación de las patas del stent entre sí y con la pared aórtica o ventricular.

Los stents están recubiertos de tejido de poliéster. El anillo de sutura de la válvula mitral contiene poliéster, a fin de permitir una fácil introducción de la aguja y reducir la resistencia a la sutura. El anillo de sutura de la válvula aórtica está festoneado, lo cual permite montarlo tanto en el interior del anillo como en posición supraanular. Si se prefiere, puede utilizarse una válvula aórtica más grande en posición supraanular en los pacientes que tienen una raíz aórtica pequeña.

Las bioprótesis aórticas y mitrales tienen suturados a ellas soportes Cinch™ desechables. Los soportes incorporan un mecanismo de trinquete. Una vez acoplado el soporte al mango, la continuación de la rotación del mango inicia el mecanismo de trinquete. Las patas del stent se desvían hacia dentro, facilitando la implantación.

La sutura que fija el soporte a la bioprótesis mitral evita que se formen lazos en las suturas del cirujano durante la implantación.

Los soportes desechables están diseñados para adaptarse al mango para válvulas de Medtronic reutilizable, Modelo 7639. El mango también se utiliza con los medidores valvulares mitrales Mosaic™, Modelo 7310, para medir el anillo.


ANDREA RODRIGUEZ
Directora Técnica
M.N. 14045 - M.P. 17090
Representante Legal
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

-11119

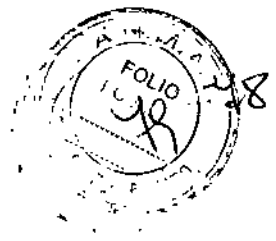


Tabla 1. Tamaños y diámetros de anillos de sutura disponibles de la bioprótesis aórtica Mosaic, Modelo 305

	A	B	C	D	E
	Tamaño de la válvula (D.E. del stent ^a) (± 0,5 mm)	Diámetro del orificio (D.I. del stent) (± 0,5 mm)	Diámetro del anillo de sutura (± 1 mm)	Altura de la válvula (± 0,5 mm)	Protrusión aórtica (± 0,5 mm)
	19	17,5	25,0	13,5	11,0
	21	18,5	27,0	15,0	12,0
	23	20,5	30,0	16,0	13,5
	25	22,5	33,0	17,5	15,0
	27	24,0	36,0	18,5	15,5
	29	26,0	39,0	20,0	16,0

Valores nominales en milímetros

^a Diámetro exterior del stent equivalente al diámetro del anillo

Tabla 2. Tamaños y diámetros de anillos de sutura disponibles del sistema de raíz pequeña de bioprótesis aórtica Mosaic Ultra™, Modelo 305

	A	B	C	D	E
	Tamaño de la válvula (D.E. del stent ^a) (± 0,5 mm)	Diámetro del orificio (D.I. del stent) (± 0,5 mm)	Diámetro del anillo de sutura (± 1 mm)	Altura de la válvula (± 0,5 mm)	Protrusión aórtica (± 0,5 mm)
	19	17,5	24,0	13,5	11,0
	21	18,5	26,0	15,0	12,0
	23	20,5	28,0	16,0	13,5
	25	22,5	30,0	17,5	15,0
	27	24,0	32,0	18,5	15,5
	29	26,0	34,0	20,0	16,0

Valores nominales en milímetros

^a Diámetro exterior del stent equivalente al diámetro del anillo

Tabla 3. Tamaños y diámetros de anillos de sutura disponibles de la bioprótesis mitral Mosaic, Modelo 310

	A	B	C	D	E
	Tamaño de la válvula (D.E. del stent ^a) (± 0,5 mm)	Diámetro del orificio (D.I. del stent) (± 0,5 mm)	Diámetro del anillo de sutura (± 1 mm)	Altura de la válvula (± 0,5 mm)	Protrusión aórtica (± 0,5 mm)
	25	22,5	33,0	18,0	13,5
	27	24,0	35,0	19,0	14,0
	29	26,0	38,0	20,5	15,5
	31	28,0	41,0	22,0	17,0
	33	30,0	43,0	23,0	17,5


Valores nominales en milímetros

^a Diámetro exterior del stent equivalente al diámetro del anillo

Notas:

1. Valores nominales en milímetros
2. Diámetro exterior del stent equivalente al diámetro del anillo

ANDREA RODRIGUEZ
 Directora Técnica
 M.N. 14045 - M.P. 17090
 Representante Legal
 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

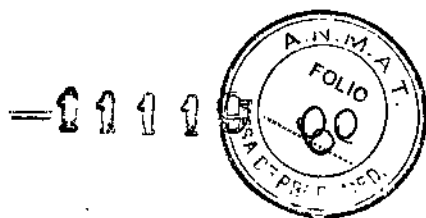

49

Los medidores están fabricados con polisulfona transparente y acero inoxidable para permitir la observación directa del perfil de la válvula bioprostética dentro del anillo valvular anatómico del paciente.

Cada medidor cuenta con dos extremos conectados por un alambre dúctil de acero inoxidable. Estos medidores están diseñados para ayudar al cirujano a seleccionar el tamaño ideal de las bioprótesis porcinas aórticas Mosaic™.

- Los medidores aórticos Mosaic™ Cinch™, modelo 7308C, incluyen los siguientes tamaños: 19 mm, 21 mm, 23 mm, 25 mm, 27 mm y 29 mm.
- Los medidores aórticos Mosaic™ Cinch™, modelo 7310, incluyen los siguientes tamaños: 25 mm, 27 mm, 29 mm, 31mm y 33mm.
- Los medidores aórticos Mosaic Ultra™, modelo 7308U, incluyen los siguientes tamaños: 19 mm, 21 mm, 23 mm, 25 mm, 27 mm y 29 mm.
- Los medidores aórticos supra anulares Hancock II Ultra™ Supra-X™, Modelo 7505UX, incluyen los siguientes tamaños: 21 mm, 23 mm, 25 mm, 27 mm y 29 mm.

INDICACION DE USO

Las bioprótesis Mosaic están indicadas para la sustitución de válvulas aórticas y mitrales patológicas o protésicas.

Contraindicaciones

Los pacientes con insuficiencia renal crónica, sometidos a hemodiálisis o con un trastorno del metabolismo del calcio pueden tener una mayor propensión a la calcificación de las bioprótesis valvulares. Las válvulas bioprotésicas también son propensas a la calcificación en niños. También puede estar contraindicada la utilización de la válvula mitral en pacientes con un ventrículo izquierdo pequeño e hipertrofiado ya que pueden existir posibilidades de obstrucción del tracto de salida o de perforación de la pared ventricular por las patas del stent. El médico debe considerar detenidamente estos riesgos al seleccionar una válvula de sustitución apropiada para estos pacientes.

Advertencias y medidas preventivas

Advertencias

Este dispositivo es válido para su uso en un solo paciente. No reutilice, reprocese ni reesterilice este producto. La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización del dispositivo pueden poner en peligro su integridad estructural o generar riesgos de contaminación del mismo que podrían provocar al paciente lesiones, enfermedades o incluso la muerte.

2

ANDREA RODRIGUEZ
Directora Técnica
M.N. 17045 - M.P. 17090
Representante Legal
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

=11119



Compruebe el indicador de temperatura de transporte que se encuentra en el interior de la caja de cartón. Si la ventana del indicador de temperatura de transporte está negra, la válvula no es apta para uso clínico.

No reesterilice la válvula mediante ningún método. La exposición de la bioprótesis y del envase a radiación, vapor, óxido de etileno u otros esterilizantes químicos la dejará inutilizable.

No utilice la válvula si se ha dañado. Tenga mucho cuidado para evitar dañar el delicado tejido de la válvula. No manipule con instrumentos la parte de tejido de la bioprótesis. Incluso una pequeña perforación podría aumentar de tamaño con el tiempo y producir una insuficiencia valvular significativa. Si se daña la válvula durante la inserción, no intente repararla.

No enjuague la bioprótesis en solución antibiótica.

No escoja una bioprótesis demasiado grande. Si se implanta una válvula demasiado grande, puede deformarse el stent u obstruirse la entrada de la válvula y aumentar el riesgo de estenosis, insuficiencia o disminución de la vida útil de la válvula.

Si se implanta una válvula demasiado pequeña, puede aumentar el riesgo de estenosis.

Medidas preventivas

Para evitar que se seque el tejido de la válvula, irrigue periódicamente la bioprótesis con solución salina fisiológica estéril durante la implantación.

Identifique la superficie de entrada y de salida de la bioprótesis antes de suturarla.

Al seleccionar el tamaño de una válvula, tenga en cuenta la anatomía del paciente y seleccione una válvula que satisfaga adecuadamente sus necesidades hemodinámicas. En la sustitución de la válvula aórtica, seleccione una válvula que encaje perfectamente en la raíz aórtica. No intente insertar una válvula demasiado grande.

En la sustitución de la válvula aórtica, oriente las patas del stent y asiente la válvula de manera que no se obstruyan los ostiums coronarios. En la sustitución de la válvula mitral, seleccione una bioprótesis que pueda adaptarse al tamaño y a la disposición del ventrículo y del anillo tisular.

Precaución: Para evitar la posible obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo por las patas del stent, oriente la bioprótesis en el anillo mitral de manera que la distancia intercomisural máxima coincida con el tracto de salida del ventrículo izquierdo del paciente.

Vista la válvula desde la parte superior del borde de sutura, el espacio máximo entre las patas se encuentra entre el marcador de sutura verde del anillo y la primera pata en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Oriente la bioprótesis en el anillo con el marcador de sutura verde dirigido aproximadamente hacia el trígono fibroso derecho.

ANDREA RODRIGUEZ
Directora Técnica
M.N. 14045 - M.P. 17090
Representante Legal
MEDTRONIC LATIN AMERICA S.A.

Esta posición situará correctamente la distancia intercomisural máxima (Figura 14). Compruebe que la posición es correcta examinando la orientación de las patas del stent en el ventrículo antes de anudar las suturas de implantación.

Para evitar que se enrolle la sutura con las patas del stent, mantenga la tensión en la sutura al hacer descender la bioprótesis al anillo mitral. Examine la parte ventricular de la bioprótesis para comprobar que las suturas no han formado un lazo alrededor de las patas del stent.

No utilice agujas cortantes, ya que podrían dañar la estructura de la bioprótesis. Tenga en cuenta los posibles daños antes de pasar catéteres, instrumentos quirúrgicos o cables de estimulación transvenosa a través de la válvula.

Si se utilizan suturas interrumpidas, es importante cortarlas cerca de los nudos. Asegúrese de que los extremos expuestos de las suturas no entran en contacto con el tejido de las valvas.


Tenga cuidado al realizar las suturas a través del anillo de sutura para evitar posibles desgarros del tejido de las valvas.

No utilice medidores valvulares de otros fabricantes ni medidores universales para determinar el tamaño adecuado de la bioprótesis Mosaic.

EFFECTOS ADVERSOS

Algunos de los posibles efectos adversos asociados al uso de válvulas cardíacas bioprotésicas son:

- Disritmias cardíacas
- Muerte
- Endocarditis
- Hemólisis
- Hemorragia relacionada con el tratamiento anticoagulante o antiagregante plaquetario
- Fuga transvalvular o paravalvular
- Disfunción no estructural (crecimiento obstructivo de tejido de granulación, dehiscencia de las suturas, tamaño inapropiado, etc.)
- Deterioro estructural (calcificación, desgarramiento de las valvas, estenosis, etc.)
- Tromboembolia
- Trombosis valvular
- Angina
- Insuficiencia cardíaca
- Anemia hemolítica
- Infarto de miocardio
- Ictus

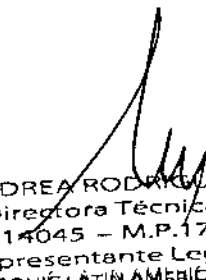
ANDREA RODRÍGUEZ
Directora Técnica
M.N. 14045 - M.P. 17090
Representante Legal
MEDTRONIC LATÍN AMÉRICA INC.



INSTRUCCIONES DE USO

Instrucciones de manipulación y preparación

La selección del tamaño apropiado de la bioprótesis es esencial para la sustitución de válvulas cardíacas. Utilice calibradores aórticos Mosaic™, Modelo 7308C, medidores valvulares aórticos Mosaic Ultra™, Modelo 7308U, o medidores valvulares mitrales Mosaic™, Modelo 7310, para seleccionar el tamaño adecuado de la bioprótesis. Si desea obtener más información, consulte las instrucciones de uso correspondientes.

Dentro del campo quirúrgico estéril, prepare dos cubetas de enjuague, cada una con 500 mL de solución salina fisiológica estéril.

La parte exterior del envase del dispositivo y la tapa no son estériles. Inspeccione el precinto para verificar que el envase no presenta daños ni ha sido abierto con anterioridad. No utilice la bioprótesis si todas las cintas de precinto están dañadas. Gire la tapa en sentido contrario al de las agujas del reloj y abra el envase (Figura 1).



Figura 1

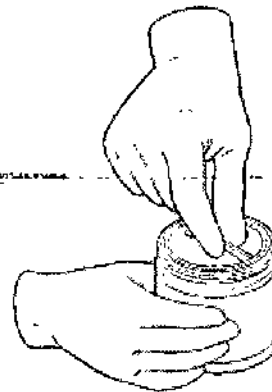


Figura 2

La bioprótesis y todos los componentes de acondicionamiento incluidos en el interior del envase son estériles y deben manipularse en consecuencia. Con los dedos pulgar e índice, sujete el recipiente de retención y extraiga la bioprótesis lentamente del envase; deje que escurra la solución conservante de glutaraldehído (Figura 2).

Compruebe que el número de serie indicado en el recipiente de retención coincide con el indicado en la tapa del envase, la caja de cartón y el formulario de registro del paciente. Anote el número de serie en la historia clínica del paciente utilizando las pegatinas proporcionadas en el formulario de registro del paciente.

Sujete el recipiente de retención en posición vertical. Quite la tapa del recipiente de retención girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj con los dedos pulgar e índice (Figura 3). Se verá el soporte de la válvula.

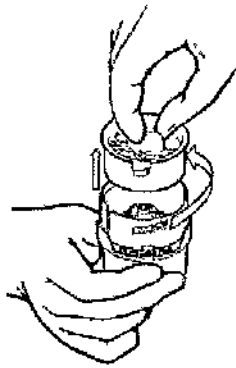


Figura 3



Figura 4

Mientras sujeta el recipiente de retención, introduzca un mango para válvulas de Medtronic estéril en el soporte.

Para fijar el mango, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para introducirlo en la abertura roscada del soporte hasta que note resistencia. Deje de girarlo cuando oiga un primer "clac" (Figura 4).

Precaución: No apriete excesivamente el mango, ya que accionaría el mecanismo de trinquete.

Tire hacia arriba del mango para extraer la bioprótesis del recipiente de retención (Figura 5).

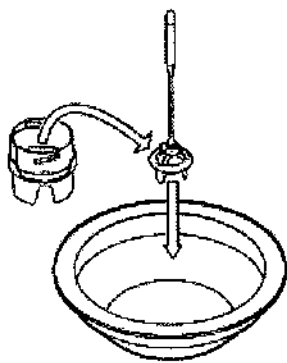


Figura 5

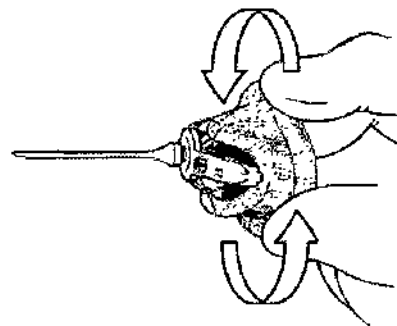


Figura 6

ANDREA RODRIGUEZ
Directora Técnica
M.N. 14045 - M.P. 17090
Representante Legal
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

Procedimiento de enjuague

Utilizando el mango, agite continuamente la válvula entera y el soporte durante al menos 30 segundos en una de las cubetas de enjuague (Figura 5). Presione suavemente el anillo de sutura para eliminar los restos de glutaraldehído. Ponga la válvula en la segunda cubeta. No toque la parte de tejido de la bioprótesis. La válvula debe permanecer en la cubeta hasta que el cirujano la precise.

Implantación de una válvula aórtica

Oriente la válvula aórtica de manera que el stent y el anillo de sutura no obstruyan los ostiums coronarios. Durante la implantación, irrigue periódicamente la válvula con solución salina fisiológica estéril para evitar que se seque el delicado tejido de la válvula.

La desviación del stent se consigue sujetando suavemente el anillo de sutura de la bioprótesis y girando el mango en el sentido de las agujas del reloj (Figura 6). Se entiende que el soporte aórtico Cinch, que se muestra sin desviar, está completamente desviado cuando no se ven dos de las tres puntas de las patas del stent por debajo del cuerpo del soporte azul al mirar el soporte desde la parte inferior (Figura 8 y Figura 9). Una mayor desviación no aumenta los beneficios del implante. No desvíe las patas del stent más de la posición de desviación completa.

Se recomienda desviar el stent antes de hacer descender la válvula a la aorta. No permita que las patas del stent permanezcan en una posición de desviación durante más de 30 minutos.

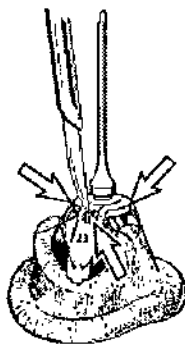


Figura 7

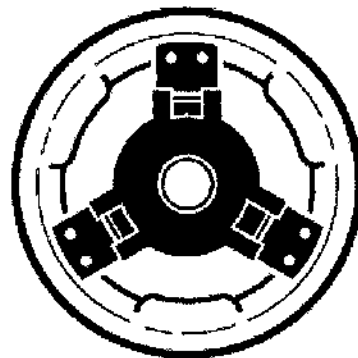


Figura 8

Precaución: La sutura utilizada para desviar las patas del stent podría romperse si se aprieta demasiado el mango. Si la sutura del soporte se rompe durante la desviación de las patas del stent de la válvula, examine el stent de la válvula para asegurarse de que no quedan restos de la sutura

C

ANDREA RODRIGUEZ
Directora Técnica
M.N. 17045 - M.P. 17090
Representante Legal
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

después de la extracción del soporte. Si se encuentran restos de la sutura, extraígalos antes de finalizar la implantación de la válvula.

Después de colocar las suturas en el anillo de sutura, colocar la válvula en el anillo y atar todos los nudos, corte las suturas del soporte de la válvula para liberarlo (Figura 7).

Mantenga la bioprótesis en su lugar y retire suavemente el soporte y las suturas del soporte. Examine el anillo de sutura, las patas del stent y el soporte de la válvula para asegurarse de que no quedan restos de las suturas del soporte en la válvula. Si se encuentran restos de la sutura, extraígalos antes de finalizar la implantación de la válvula. Desacople el mango del soporte y deseche el soporte.

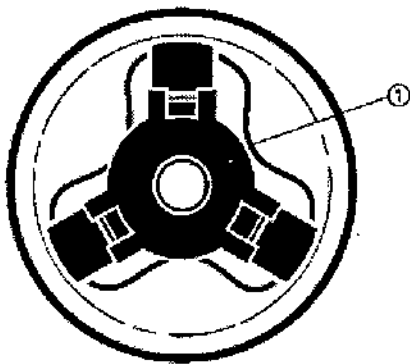


Figura 9

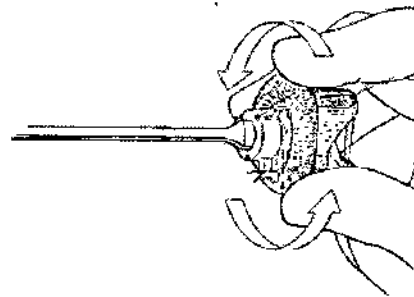


Figura 10

Implantación de una válvula mitral

Accione el mecanismo de trinquete del soporte sujetando suavemente el anillo de sutura de la bioprótesis y girando el mango en el sentido de las agujas del reloj (Figura 10). Las patas del stent se desvían hacia dentro para facilitar la inserción de la válvula en el anillo del paciente. Se entiende que el soporte mitral Cinch, que se muestra sin desviar, está completamente desviado cuando hay una separación de 1 a 2 mm entre dos de las tres patas del stent al mirar el soporte desde la parte inferior (Figura 12 y Figura 13). Una mayor desviación no aumenta los beneficios del implante. No desvíe las patas del stent más de la posición de desviación completa.

Precaución: La sutura utilizada para desviar las patas del stent podría romperse si se aprieta demasiado el mango. Si la sutura del soporte se rompe durante la desviación de las patas del stent de la válvula, examine el stent de la válvula para asegurarse de que no quedan restos de la sutura después de extraer el soporte. Si se encuentran restos de las suturas, extraígalos antes de finalizar la implantación de la válvula.



= 11119
86

Precaución: Si la bioprótesis se implanta con suturas del soporte rotas, podrían formarse lazos de las suturas del cirujano alrededor de las patas del stent y producirse daños y un importante deterioro de la función de la bioprótesis.

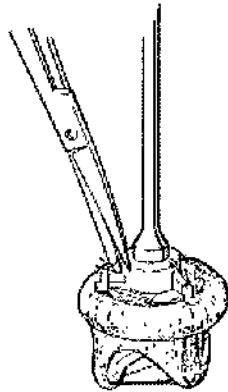


Figura 11

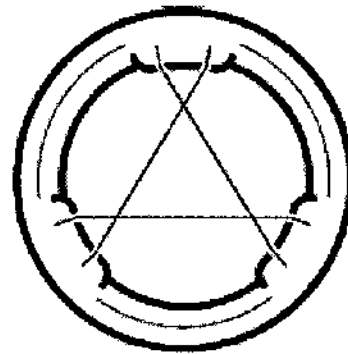


Figura 12

Precaución: Tenga especial cuidado al implantar una bioprótesis en posición mitral en un paciente con un ventrículo izquierdo de dimensiones reducidas. Es preciso disponer de espacio suficiente para evitar el contacto entre las patas del stent de la bioprótesis y la pared ventricular. Si estas estructuras entran en contacto de forma repetida, la pared ventricular podría perforarse.

Precaución: Para evitar la posible obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo por las patas del stent, oriente la bioprótesis en el anillo mitral de manera que la distancia intercomisural máxima coincida con el tracto de salida del ventrículo izquierdo del paciente.

Vista la válvula desde la parte superior del borde de sutura, el espacio máximo entre las patas se encuentra entre el marcador de sutura verde del anillo y la primera pata en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Oriente la bioprótesis en el anillo con el marcador de sutura verde dirigido aproximadamente hacia el triángulo fibroso derecho.

Esta posición situará correctamente la distancia intercomisural máxima (Figura 14). Compruebe que la posición es correcta examinando la orientación de las patas del stent en el ventrículo antes de anudar las suturas de implantación.

Durante la implantación, irrigue periódicamente la válvula con solución salina fisiológica estéril para evitar que se seque el delicado tejido de la válvula. Después de colocar las suturas, haga descender la válvula al anillo. Tenga cuidado de evitar que las suturas se enreden. Para ello, mantenga la tensión de las suturas. No utilice agujas cortantes, ya que podrían dañar la estructura de la bioprótesis.

Después de colocar la válvula en el anillo, corte las tres suturas del soporte con unas tijeras o un bisturí para retirar el soporte (Figura 11).

ANDREA RODRIGUEZ
Directora Técnica
M.N. 14045 - M.P. 17090
Representante Legal
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC



Envasado

La bioprótesis Mosaic se ha sometido a esterilización química líquida y se suministra estéril en una solución de glutaraldehído al 0,2 % tamponada. La esterilidad se pone en peligro si el frasco de cristal y la tapa del envase están abiertos o dañados. El exterior del envase no está esterilizado. No coloque el envase en el campo estéril.

Almacenamiento

Conserve la bioprótesis Mosaic a una temperatura de entre 5 °C y 25 °C (41 °F y 77 °F). No se precisa refrigeración; la congelación puede dañar las bioprótesis. El almacenamiento a temperatura ambiente hasta 25 °C (77 °F) es adecuado siempre que la bioprótesis no esté expuesta a la luz solar ni a otras fuentes de luz ultravioleta ni se coloque en lugares con fluctuaciones importantes de temperatura.

Mantenga un control adecuado del inventario de manera que se implanten antes aquellas bioprótesis cuya fecha de caducidad sea más temprana, con objeto de evitar la caducidad de las mismas.

Devolución de bioprótesis explantadas

Medtronic tiene interés en recuperar las bioprótesis Mosaic explantadas. Cuando se considere apropiado, un anatomopatólogo asesor estudiará las bioprótesis explantadas. Se devolverá al médico un informe escrito en el que se resumirán los resultados obtenidos. Para solicitar equipos de devolución del producto, incluido un formulario de información de explantación, póngase en contacto con un centro de distribución de Medtronic o con el representante de Medtronic. Es importante rellenar completamente el formulario de explantación. Si no dispone de un equipo de devolución, coloque la bioprótesis explantada en un recipiente con una solución de glutaraldehído o formalina al 10 % tamponada inmediatamente después de la escisión. Si desea obtener más instrucciones sobre la devolución de un dispositivo explantado, póngase en contacto con el representante de Medtronic.


Información del paciente

Información de registro

Nota: El registro de pacientes no es aplicable en países en los que las leyes de privacidad de los pacientes entran en conflicto con la provisión de información del paciente, incluidos los países de la Unión Europea.

ANDREA RODRIGUEZ
Directora Técnica
M.N. 14045 - M.P. 7090
Representante Legal
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.

= 19149

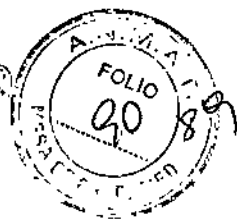

Todos los envases de los dispositivos incluyen un formulario de registro del paciente. Después de la implantación, rellene los datos solicitados. El número de serie se encuentra en el envase y en la etiqueta de identificación adherida al recipiente de retención. Devuelva el formulario original a la dirección de Medtronic que consta en él y entregue al paciente la tarjeta de identificación temporal antes de darle el alta.

Se proporciona al paciente una tarjeta identificativa del dispositivo implantado. La tarjeta contiene el nombre y el número de teléfono del médico del paciente, así como aquella información que el personal médico requeriría en caso de urgencia.

Información posoperatoria

Compatibilidad con exploración por resonancia magnética (RM)

Se ha demostrado a través de pruebas no clínicas y modelos que la bioprótesis Mosaic es condicionalmente compatible con la resonancia magnética (RM). Puede someterse de forma segura a estudios de resonancia magnética en las siguientes condiciones:

- campo magnético estático igual o inferior a 3,0 T
- campo de gradiente espacial igual o inferior a 2.500 Gs/cm
- modo controlado de primer nivel o normal con una tasa de absorción específica (TAE) de cuerpo entero máxima de 4 W/kg durante 15 minutos

Calentamiento por radiofrecuencia

Basándose en pruebas no clínicas y modelos, se calcula que el dispositivo provoca un aumento de la temperatura inferior a 2,2 °C a 64 MHz (1,5 T) y 128 MHz (3,0 T) para una TAE de cuerpo entero promedio de 4,0 W/kg durante 15 minutos de exploración por RM.

Desviación y torsión

El dispositivo no se moverá ni se desplazará al ser expuesto a una exploración por RM justo después de la implantación. Los pacientes no se expondrán a un riesgo añadido por la fuerza magnética y la fuerza de torsión ejercidas sobre el armazón de la válvula durante la exploración por RM en las condiciones descritas anteriormente.

Artefactos en las imágenes

La calidad de las imágenes de RM puede verse afectada si el área de interés se encuentra en la misma zona o relativamente cerca de la posición del dispositivo. Puede ser necesario optimizar los parámetros de exploración por RM en relación con la presencia de este implante. Cuando se

ANDREA RODRIGUEZ
Directora Técnica
M.N. 14045 - M.P. 17090
Representante Legal
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC

prueba a 3,0 T, el dispositivo muestra una distorsión moderada con una amplitud de distorsión aproximada del dispositivo de menos de 20 mm para imágenes de eco gradiente y eco de espín. La presencia de otros implantes o circunstancias médicas del paciente puede requerir límites más bajos en algunos o todos los parámetros anteriores.

Accesorios

Utilice los siguientes calibradores o medidores valvulares para determinar el tamaño adecuado de la bioprótesis Mosaic.

- Calibradores aórticos Mosaic, Modelo 7308C
- Calibradores aórticos Mosaic Ultra, Modelo 7308U
- Medidores valvulares mitrales Mosaic, Modelo 7310
- Mango para válvulas de Medtronic, Modelo 7639
- Tuerca de bloqueo de Medtronic, Modelo 7642
- Los medidores aórticos supra anulares Hancock II Ultra™ Supra-X™, Modelo 7505UX

Precaución: No utilice calibradores/medidores valvulares de otros fabricantes ni calibradores/medidores valvulares diseñados para otras prótesis de Medtronic para determinar el tamaño adecuado de la bioprótesis Mosaic.

Precaución: No utilice los accesorios hasta que se hayan limpiado y esterilizado minuciosamente. Consulte el apartado correspondiente para obtener instrucciones.

Esterilización/reesterilización

- Los accesorios y la bandeja deben colocarse en una bolsa de esterilización o en un paño para autoclave antes de su esterilización. Asegúrese de que la bolsa o la bandeja es lo suficientemente grande como para que quepan los accesorios sin que las uniones del envase queden tensas. En la validación llevada a cabo por Medtronic se utilizó la bandeja de accesorios adecuada para cada dispositivo.
- Al esterilizar varios dispositivos en un ciclo de autoclave, asegúrese de que no se sobrepase la máxima carga permitida por el esterilizador.
- Compruebe que los dispositivos no presenten desgaste o deterioro antes de utilizarlos. No los utilice si los componentes muestran señales de desgaste o deterioro.

Esterilización por vapor

Tipo de ciclo	Prevacio	Prevacio	Gravedad
Temperatura	132 °C (270 °F)	135 °C (275 °F)	132 °C (270 °F)
Tiempo de exposición	4 minutos	3 minutos	15 minutos
Tiempo de secado	30 minutos	16 minutos	15 minutos

ANDREA RODRIGUEZ
 Directora Técnica
 M.N. 14045 – M.P. 17090
 Representante legal
 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.