



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

6 3 9 9

BUENOS AIRES,

0 5 SEP 2014

VISTO el Expediente N° 1-47-3880-14-9 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones DENTAL MEDRANO S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Gestión de Información Técnica.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº

6 3 9 9

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y 1271/13.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MÉDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca ALPEN, nombre descriptivo FRESAS DE CARBURO y nombre técnico FRESAS DENTALES, de acuerdo a lo solicitado por DENTAL MEDRANO S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 66 y 10 a 14 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-235-162, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 5º - La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 6º - Regístrese. Inscribáse en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas de la Dirección Nacional de Productos Médicos notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº 6399

sus Anexos I, II y III. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese PERMANENTE.

Expediente Nº 1-47-3880-14-9

DISPOSICIÓN Nº

gs

6399

Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°**6399**.....

Nombre descriptivo: FRESAS DE CARBURO.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 10-521 - FRESAS
DENTALES.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): ALPEN.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Preparación de cavidades para obturación o
tratamiento endodóntico, remoción de coronas u otras restauraciones, dar
forma y preparar tanto diente como muñón para corona cerámica o metálica.

Modelo/s: 60018590 ALPEN CARBIDE FG 1.

60018591 ALPEN CARBIDE FG 2.

60018592 ALPEN CARBIDE FG 3.

60018593 ALPEN CARBIDE FG 4.

60018594 ALPEN CARBIDE FG 5.

60018595 ALPEN CARBIDE FG 34.

60018596 ALPEN CARBIDE FG 35.

60018597 ALPEN CARBIDE FG 36.

60018598 ALPEN CARBIDE FG 37.

60018599 ALPEN CARBIDE FG 169.

60018600 ALPEN CARBIDE FG 170.

60018601 ALPEN CARBIDE FG 171.

60018602 ALPEN CARBIDE FG 245.

60018603 ALPEN CARBIDE FG 329.

60018604 ALPEN CARBIDE FG 330.

60018605 ALPEN CARBIDE FG 331.

60018606 ALPEN CARBIDE FG 332.

60018607 ALPEN CARBIDE FG 556.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

- 60018608 ALPEN CARBIDE FG 557.
- 60018609 ALPEN CARBIDE FG 558.
- 60018610 ALPEN CARBIDE FG 699.
- 60018611 ALPEN CARBIDE FG 700.
- 60018612 ALPEN CARBIDE FG 701.
- 60018613 ALPEN CARBIDE FG 702.
- 60018614 ALPEN CARBIDE FG 1156.
- 60018615 ALPEN CARBIDE FG 1157.
- 60018616 ALPEN CARBIDE FG 1170.
- 60018617 ALPEN CARBIDE FG 1171.
- 60018618 ALPEN CARBIDE FG 1556.
- 60018619 ALPEN CARBIDE FG 1557.
- 60018620 ALPEN CARBIDE FGXL 2.
- 60018621 ALPEN CARBIDE FGXL 4.
- 60018622 ALPEN CARBIDE FGXL 557.
- 60018623 ALPEN CARBIDE FGXL 558.
- 60018624 ALPEN CARBIDE FGXL 702.
- 60018625 ALPEN CARBIDE FG12F 7406.
- 60018626 ALPEN CARBIDE FG 1/2.
- 60018627 ALPEN CARBIDE FG 1/4.
- 60018628 ALPEN CARBIDE FG 170L.
- 60018629 ALPEN CARBIDE FG 330L.
- 60018630 ALPEN CARBIDE FG 331L.
- 60018631 ALPEN CARBIDE FG 557L.
- 60018632 ALPEN CARBIDEFGXL 199Z.
- 60018633 ALPEN CARBIDE FG 152EZ.
- 60018634 ALPEN CARBIDE FG 219EZ.
- 60018635 ALPEN CARBIDE FG 6.
- 60018636 ALPEN CARBIDE FG 7.
- 60018637 ALPEN CARBIDE FG 8.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

60018638 ALPEN CARBIDE FG 37L.
60018639 ALPEN CARBIDE FG 56.
60018640 ALPEN CARBIDE FG 57.
60018641 ALPEN CARBIDE FG 58.
60018642 ALPEN CARBIDE FG 703.
60018643 ALPEN CARBIDE FG 1558.
60018644 ALPEN CARBIDE FG 169L.
60018645 ALPEN CARBIDE FG 33 1/2.
60018646 ALPEN CARBIDE RA 1.
60018647 ALPEN CARBIDE RA 2.
60018648 ALPEN CARBIDE RA 3.
60018649 ALPEN CARBIDE RA 4.
60018650 ALPEN CARBIDE RA 5.
60018651 ALPEN CARBIDE RA 6.
60018652 ALPEN CARBIDE RA 7.
S, 60018653 ALPEN CARBIDE RA 8.
60018654 ALPEN CARBIDE RA 701.
60018655 ALPEN CARBIDE FGXL 6.
60018656 ALPEN CARBIDE FGXL 8.
60018657 ALPEN CARBIDE FGXL 700.
60018658 ALPEN CARBIDE FGXL 701.
60018659 ALPEN CARBIDE HP 4.
60018660 ALPEN CARBIDE HP 6.
60018661 ALPEN CARBIDE HP 8.
60018662 ALPEN CARBIDE HP 558.
60018663 ALPEN CARBIDE HP 560.
60018664 ALPEN CARBIDE HP 700.
60018665 ALPEN CARBIDE HP 701.
60018666 ALPEN CARBIDE HP 702.
60018667 ALPEN CARBIDE HP 703.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 60018668 ALPEN CARBIDE HP 1557.
- 60018669 ALPEN CARBIDE HP 702L.
- 60018670 ALPEN CARBIDE HP 703L.
- 60018671 ALPEN CARBIDE FG12F 7006.
- 60018672 ALPEN CARBIDE RAXL 2.
- 60018673 ALPEN CARBIDE RAXL 4.
- 60018674 ALPEN CARBIDE RAXL 6.
- 60018675 ALPEN CARBIDE RAXL 8.

Periodo de vida útil: 60 meses.

Formas de presentación: Las fresas de carburo están embalados en packs y pouchs individuales pre-esterilizados mediante su sistema SteriX, contenidas en una caja contenedora de rollos de 10 fresas por pouch individual.

Los envases pueden contener: 10 unidades / 25 unidades/ 50 unidades/ 100 unidades.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: COLTÈNE/WHALEDENT Inc.


Lugar/es de elaboración: 235 Ascot Parkway, Cuyahoga Falls, OH 44223, Estados Unidos.

Expediente N° 1-47-3880-14-9

DISPOSICIÓN N°

95

6 3 9 9

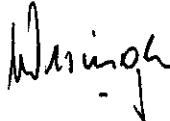
Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTOS DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

8

.....
6399

Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



Marca:

ALPEN

6 3 9 9

Nombre genérico:

Fresas de carburo

Modelos:

- 60018590 ALPEN CARBIDE FG 1
- 60018591 ALPEN CARBIDE FG 2
- 60018592 ALPEN CARBIDE FG 3
- 60018593 ALPEN CARBIDE FG 4
- 60018594 ALPEN CARBIDE FG 5
- 60018595 ALPEN CARBIDE FG 34
- 60018596 ALPEN CARBIDE FG 35
- 60018597 ALPEN CARBIDE FG 36
- 60018598 ALPEN CARBIDE FG 37
- 60018599 ALPEN CARBIDE FG 169
- 60018600 ALPEN CARBIDE FG 170
- 60018601 ALPEN CARBIDE FG 171
- 60018602 ALPEN CARBIDE FG 245
- 60018603 ALPEN CARBIDE FG 329
- 60018604 ALPEN CARBIDE FG 330
- 60018605 ALPEN CARBIDE FG 331
- 60018606 ALPEN CARBIDE FG 332
- 60018607 ALPEN CARBIDE FG 556
- 60018608 ALPEN CARBIDE FG 557
- 60018609 ALPEN CARBIDE FG 558
- 60018610 ALPEN CARBIDE FG 699
- 60018611 ALPEN CARBIDE FG 700
- 60018612 ALPEN CARBIDE FG 701
- 60018613 ALPEN CARBIDE FG 702
- 60018614 ALPEN CARBIDE FG 1156
- 60018615 ALPEN CARBIDE FG 1157
- 60018616 ALPEN CARBIDE FG 1170
- 60018617 ALPEN CARBIDE FG 1171
- 60018618 ALPEN CARBIDE FG 1556
- 60018619 ALPEN CARBIDE FG 1557
- 60018620 ALPEN CARBIDE FGXL 2
- 60018621 ALPEN CARBIDE FGXL 4
- 60018622 ALPEN CARBIDE FGXL 557
- 60018623 ALPEN CARBIDE FGXL 558
- 60018624 ALPEN CARBIDE FGXL 702

DENTAL MEDRANO S.A.
Marta D. de Etchegoin
MARTA D. de ETCHEGOIN
APODERADA
D.N.I. 4.095.497

Dr. Armandó Bababera
Dr. ARMANDO BABABERA
BIOQUÍMICO - FARMACEUTA
DIRECTOR TÉCNICO
DENTAL MEDRANO S.A.



6399

- 60018625 ALPEN CARBIDE FG12F 7406
- 60018626 ALPEN CARBIDE FG 1/2
- 60018627 ALPEN CARBIDE FG 1/4
- 60018628 ALPEN CARBIDE FG 170L
- 60018629 ALPEN CARBIDE FG 330L
- 60018630 ALPEN CARBIDE FG 331L
- 60018631 ALPEN CARBIDE FG 557L
- 60018632 ALPEN CARBIDEFGXL 199Z
- 60018633 ALPEN CARBIDE FG 152EZ
- 60018634 ALPEN CARBIDE FG 219EZ
- 60018635 ALPEN CARBIDE FG 6
- 60018636 ALPEN CARBIDE FG 7
- 60018637 ALPEN CARBIDE FG 8
- 60018638 ALPEN CARBIDE FG 37L
- 60018639 ALPEN CARBIDE FG 56
- 60018640 ALPEN CARBIDE FG 57
- 60018641 ALPEN CARBIDE FG 58
- 60018642 ALPEN CARBIDE FG 703
- 60018643 ALPEN CARBIDE FG 1558
- 60018644 ALPEN CARBIDE FG 169L
- 60018645 ALPEN CARBIDE FG 33 1/2
- 60018646 ALPEN CARBIDE RA 1
- 60018647 ALPEN CARBIDE RA 2
- 60018648 ALPEN CARBIDE RA 3
- 60018649 ALPEN CARBIDE RA 4
- 60018650 ALPEN CARBIDE RA 5
- 60018651 ALPEN CARBIDE RA 6
- 60018652 ALPEN CARBIDE RA 7
- 60018653 ALPEN CARBIDE RA 8
- 60018654 ALPEN CARBIDE RA 701
- 60018655 ALPEN CARBIDE FGXL 6
- 60018656 ALPEN CARBIDE FGXL 8
- 60018657 ALPEN CARBIDE FGXL 700
- 60018658 ALPEN CARBIDE FGXL 701
- 60018659 ALPEN CARBIDE HP 4
- 60018660 ALPEN CARBIDE HP 6
- 60018661 ALPEN CARBIDE HP 8
- 60018662 ALPEN CARBIDE HP 558
- 60018663 ALPEN CARBIDE HP 560
- 60018664 ALPEN CARBIDE HP 700

DENTAL MEDRANO S.A.

MARTA D. de ETCHEGON
APODERADA
D.N.I. 4.095.497

Dr. ARMANDO BABAHEKTIAN
BIOQUÍMICO - FARMACÉUTICO
DIRECTOR TÉCNICO
DENTAL MEDRANO S.A.



6399

60018665	ALPEN CARBIDE HP 701
60018666	ALPEN CARBIDE HP 702
• 60018667	ALPEN CARBIDE HP 703
60018668	ALPEN CARBIDE HP 1557
60018669	ALPEN CARBIDE HP 702L
60018670	ALPEN CARBIDE HP 703L
60018671	ALPEN CARBIDE FG12F 7006
60018672	ALPEN CARBIDE RAXL 2
60018673	ALPEN CARBIDE RAXL 4
60018674	ALPEN CARBIDE RAXL 6
60018675	ALPEN CARBIDE RAXL 8

Fabricado por COLTÈNE/WHALEDENT Inc.

235 Ascot Parkway, Cuyahoga Falls, OH 44223 - Estados Unidos

Importado por DENTAL MEDRANO S.A.

Paraguay 3026, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Tel. 4962-9000

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Director Técnico: Farm. Armando Babahekian MN 4317

Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-235-162

INDICACIÓN

PREPARACIÓN DE CAVIDADES PARA UN RELLENO O TRATAMIENTO DEL CANAL RADICULAR, REMOVIENDO CORONAS U OTRAS RESTAURACIONES, ASÍ COMO PARA LA FORMACIÓN Y LA PREPARACIÓN TANTO DEL DIENTE COMO DE LA ESTRUCTURA DE NÚCLEO PARA LA COLOCACIÓN DE UNA CORONA DE CERÁMICA O DE METAL

Instrucciones y cuidados de uso:

Antes de cortar, asegúrese de que:

1. Examinar las fresas antes de su uso por desgaste excesivo. Cualquier fresa que muestre el desgaste debe ser retirada del servicio y ser desechada. Utilizar una fresa con desgaste excesivo, la fresa puede romperse o causar lesiones.
2. La fresa se inserta completamente en la pieza de mano.

DENTAL MEDRANO S.A.
Marta D. de Etchegoian
MARTA D. de ETCHEGOIAN
APODERADA
Q.N.I. 4.095.497

Armando Babahekian
Dr. ARMANDO BABAHEKIAN
BIQUÍMICO - FARMACÉUTICO
DIRECTOR TÉCNICO
DENTAL MEDRANO S.A.



6399

ADVERTENCIA: No permita que la fresa se extienda de la pieza de mano. Las fresas sueltas pueden ser expulsadas de la pieza de mano, puede romperse o causar daño.

3 . La fresa debe estar bien conectada a la pieza de mano

4 . La presión del aire de funcionamiento para la pieza de mano no debe ser superior a la presión de trabajo recomendada por el fabricante.

Para obtener los mejores resultados:

- 1 . Al hacer funcionar la pieza de mano, girar la fresa, antes y después del contacto con las superficies dentales.
- 2 . Utilizar una presión ligera y profusos cepillados
- 3 . Evitar el uso de la fresa con una presión de corte transversal pesado.

Métodos válidos para esterilizar fresas son:

El tratamiento en autoclave: Para evitar la corrosión del metal, se les puede agregar una solución de nitrito de sodio al 1 % como un inhibidor de la corrosión, antes del ciclo de esterilización. Las fresas pueden esterilizarse mediante esterilización pre-vacío, usando un esterilizador de vapor. Esterilizar a ciclo completo con una permanencia mínima en 134 ° C durante 6 minutos.

Nota: Después de la esterilización, las fresas dentales de carburo y acero deben secarse y almacenarse en un ambiente libre de humedad. Esto evita la posibilidad de corrosión y proporcionar una protección.

Limpieza con Ultrasonido:

La limpieza de las fresas puede ser por ultrasonido, insertándolas en los titulares de fresa (o bloques) para evitar daños por el roce contra otras superficies o entre sí.

Se recomienda un ciclo de 5 minutos, utilizando un limpiador general.

Precauciones:

- Evite soluciones desinfectantes frías. Estas soluciones no esterilizan y pueden contener agentes corrosivos que degradan el rendimiento y la fuerza de la fresa de carburo.
- Utilice dispositivos de esterilización de acuerdo con el procedimiento recomendado por el fabricante. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que la esterilización sea eficaz.

Advertencias:

- Las fresas de carburo pueden ser suministradas en estado no estéril o esterilizadas (según presentación), la presentación No estéril puede ser debidamente esterilizadas en autoclave o esterilizador de calor seco antes de su uso. Debido a su geometría intrincada de la cabeza de corte, las fresas son utilizadas en un entorno quirúrgico, no deben ser reutilizadas.
- Este producto puede contener Níquel y no debe ser utilizado en personas con reacciones alérgicas conocidas a Níquel o sus aleaciones.

DENTAL MEDRANO S.A.
Marta E. de Etcheberry
MARTA E. de ETCHEBERRY
APOBLERADA
D.N.I. 4.095.497

Armando Babahekian
Dr. ARMANDO BABAHEKIAN
BIOQUÍMICO - FARMACÉUTICO
DIRECTOR TÉCNICO
DENTAL MEDRANO S.A.



6399

- Evitar el calor y la incidencia de luz solar directa.


Contraindicaciones

No se conoce ninguna contraindicación si el producto se usa para el fin previsto.

Conservación, almacenamiento y transporte

Evitar el calor y la incidencia de luz solar directa.

Para el almacenamiento a largo plazo mantenerlos en lugar seco y protegiendo el producto médico de humedad y/o vapores ácidos.

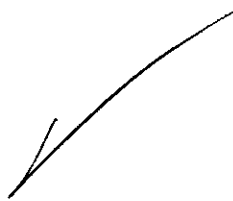

DENTAL MEDRANO S.A.
Marta D. Etchegoin
MARTA D. de ETCHEGOIN
APODERADA
G.N. 4.025.497

Armando Babahekian
Dr. ARMANDO BABAHEKIAN
BIQUÍMICO - FARMACÉUTICO
DIRECTOR TÉCNICO
DENTAL MEDRANO S.A.



6399

ALPEN

Fresas de carburo

Modelos xxx

Fabricado por COLTÈNE/WHALEDENT Inc.

235 Ascot Parkway, Cuyahoga Falls, OH 44223 - Estados Unidos

Importado por DENTAL MEDRANO S.A.

Paraguay 3026, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Tel. 4962-9000

Número de Lote **LOT**

Fecha de vencimiento 

Cantidad

DE UN SOLO USO

Estéril

Método de esterilización: radiación Gamma


VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Director Técnico: Farm. Armando Babahekian MN 4317

Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-235-162

DENTAL MEDRANO S.A.

MARTA D. de ETCHEGOIN
APODERADA
D.N.I. 4.085.487

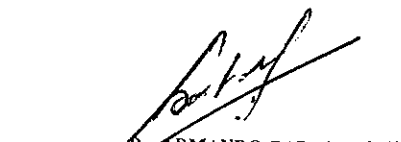
Dr. ARMANDO BABAHEKIAN
BIOQUÍMICO - FARMACÉUTICO
DIRECTOR TÉCNICO
DENTAL MEDRANO S.A.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO III
CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-3880-14-9

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **6399**, y de acuerdo a lo solicitado por DENTAL MEDRANO S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: FRESAS DE CARBURO.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 10-521 - FRESAS DENTALES.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): ALPEN.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Preparación de cavidades para obturación o tratamiento endodóntico, remoción de coronas u otras restauraciones, dar forma y preparar tanto diente como muñón para corona cerámica o metálica.

Modelo/s: 60018590 ALPEN CARBIDE FG 1.

60018591 ALPEN CARBIDE FG 2.

60018592 ALPEN CARBIDE FG 3.

60018593 ALPEN CARBIDE FG 4.

60018594 ALPEN CARBIDE FG 5.

60018595 ALPEN CARBIDE FG 34.

60018596 ALPEN CARBIDE FG 35.

60018597 ALPEN CARBIDE FG 36.

60018598 ALPEN CARBIDE FG 37.

60018599 ALPEN CARBIDE FG 169.

60018600 ALPEN CARBIDE FG 170.

60018601 ALPEN CARBIDE FG 171.

60018602 ALPEN CARBIDE FG 245.

60018603 ALPEN CARBIDE FG 329.

..//

60018604 ALPEN CARBIDE FG 330.
60018605 ALPEN CARBIDE FG 331.
60018606 ALPEN CARBIDE FG 332.
60018607 ALPEN CARBIDE FG 556.
60018608 ALPEN CARBIDE FG 557.
60018609 ALPEN CARBIDE FG 558.
60018610 ALPEN CARBIDE FG 699.
60018611 ALPEN CARBIDE FG 700.
60018612 ALPEN CARBIDE FG 701.
60018613 ALPEN CARBIDE FG 702.
60018614 ALPEN CARBIDE FG 1156.
60018615 ALPEN CARBIDE FG 1157.
60018616 ALPEN CARBIDE FG 1170.
J 60018617 ALPEN CARBIDE FG 1171.
60018618 ALPEN CARBIDE FG 1556.
60018619 ALPEN CARBIDE FG 1557.
60018620 ALPEN CARBIDE FGXL 2.
60018621 ALPEN CARBIDE FGXL 4.
60018622 ALPEN CARBIDE FGXL 557.
60018623 ALPEN CARBIDE FGXL 558.
60018624 ALPEN CARBIDE FGXL 702.
60018625 ALPEN CARBIDE FG12F 7406.
60018626 ALPEN CARBIDE FG 1/2.
60018627 ALPEN CARBIDE FG 1/4.
60018628 ALPEN CARBIDE FG 170L.
60018629 ALPEN CARBIDE FG 330L.
60018630 ALPEN CARBIDE FG 331L.
60018631 ALPEN CARBIDE FG 557L.
60018632 ALPEN CARBIDFGXL 199Z.
60018633 ALPEN CARBIDE FG 152EZ.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

60018634 ALPEN CARBIDE FG 219EZ.
60018635 ALPEN CARBIDE FG 6.
60018636 ALPEN CARBIDE FG 7.
60018637 ALPEN CARBIDE FG 8.
60018638 ALPEN CARBIDE FG 37L.
60018639 ALPEN CARBIDE FG 56.
60018640 ALPEN CARBIDE FG 57.
60018641 ALPEN CARBIDE FG 58.
60018642 ALPEN CARBIDE FG.703.
60018643 ALPEN CARBIDE FG 1558.
60018644 ALPEN CARBIDE FG 169L.
60018645 ALPEN CARBIDE FG 33 1/2.
60018646 ALPEN CARBIDE RA 1.
60018647 ALPEN CARBIDE RA 2.
60018648 ALPEN CARBIDE RA 3.
60018649 ALPEN CARBIDE RA 4.
60018650 ALPEN CARBIDE RA 5.
60018651 ALPEN CARBIDE RA 6.
60018652 ALPEN CARBIDE RA 7.
60018653 ALPEN CARBIDE RA 8.
60018654 ALPEN CARBIDE RA 701.
60018655 ALPEN CARBIDE FGXL 6.
60018656 ALPEN CARBIDE FGXL 8.
60018657 ALPEN CARBIDE FGXL 700.
60018658 ALPEN CARBIDE FGXL 701.
60018659 ALPEN CARBIDE HP 4.
60018660 ALPEN CARBIDE HP 6.
60018661 ALPEN CARBIDE HP 8.
60018662 ALPEN CARBIDE HP 558.
60018663 ALPEN CARBIDE HP 560.
60018664 ALPEN CARBIDE HP 700.

..//

- 60018665 ALPEN CARBIDE HP 701.
- 60018666 ALPEN CARBIDE HP 702.
- 60018667 ALPEN CARBIDE HP 703.
- 60018668 ALPEN CARBIDE HP 1557.
- 60018669 ALPEN CARBIDE HP 702L.
- 60018670 ALPEN CARBIDE HP 703L.
- 60018671 ALPEN CARBIDE FG12F 7006.
- 60018672 ALPEN CARBIDE RAXL 2.
- 60018673 ALPEN CARBIDE RAXL 4.
- 60018674 ALPEN CARBIDE RAXL 6.
- 60018675 ALPEN CARBIDE RAXL 8.

Periodo de vida útil: 60 meses.

Formas de presentación: Las fresas de carburo están embalados en packs y pouchs individuales pre-esterilizados mediante su sistema SteriX, contenidas en una caja contenedora de rollos de 10 fresas por pouch individual.

Los envases pueden contener: 10 unidades / 25 unidades/ 50 unidades/ 100 unidades.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: COLTÈNE/WHALEDENT Inc.


Lugar/es de elaboración: 235 Ascot Parkway, Cuyahoga Falls, OH 44223, Estados Unidos.

Se extiende a DENTAL MEDRANO S.A. el Certificado PM-235-162, en la Ciudad de Buenos Aires, a **05 SEP 2014**, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N°

6399

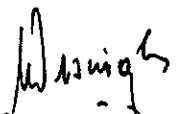


Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.