



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 6965

BUENOS AIRES, 01 SEP 2015

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-002444/14-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma Air Liquide Argentina S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1084-111, denominado: Máscaras nasales, marca RESMED.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 1490/92 y 1886/14.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1084-111, denominado: Máscaras nasales, marca RESMED.

ARTÍCULO 2º.- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1084-111.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°

6965

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, Rótulo e instrucciones de uso autorizados; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-002444-14-6

DISPOSICIÓN N°

EA

6965

Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° 5333/14, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1084-111 y de acuerdo a lo solicitado por la firma Air Liquide Argentina S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Máscaras nasales.

Marca: RESMED.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 5333/14.

Tramitado por expediente N° 1-47-5173-13-8.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Indicación de uso	Las máscaras nasales están diseñadas para ser utilizadas con respiradores que poseen válvulas de escape activas, para suministrar asistencia ventilatoria a pacientes adultos con peso mayor a 30 kg, con insuficiencia respiratoria que requieren asistencia ventilatoria que no sea de apoyo vital. Está diseñada para ser utilizada por un único paciente en repetidas ocasiones en su domicilio, o para reutilizarse en varios pacientes en hospitales o instituciones sanitarias.	Las máscaras nasales están diseñadas para dirigir, de forma no invasiva, un flujo de aire generado por un dispositivo de presión positiva (CPAP o binivel) hacia las vías respiratorias del paciente. Pueden utilizarse, tanto de forma domiciliaria como en entorno hospitalario, en más de un paciente.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

Modelos	<p>Mirage Vista Mask. Nombre genérico: Mirage Vista Nasal Mask, Mirage Vista Activa Mask. Nombre genérico: Mirage Activa, Activa LT y Activa Nasal Mask, Resmed Hospital Nasal Mask, Resmed Meridian Mask, Ultra Mirage II Nasal Mask. Nombre genérico: Ultra Mirage II Nasal Mask VPAP III ST-A/ Kidsta Mask Systems. Nombre genérico: Kidsta y Kidsta Nasal Mask, Mirage Micro: Nombre genérico: Mirage Micro Nasal Mask, Swift LT. Nombre genérico: Swift LT y Swift LT For Her, Swift FX. Nombre genérico: Swift FX y Swift FX For Her, Pixi Pediátric Mask. Nombre genérico: Pixi, Mirage FX. Nombre genérico: Mirage FX y Mirage FX For Her, Swift Fx Bella.</p>	<p>Mirage (FX, FX for Her, Kidsta, Micro) Mirage (Activa, Activa LT, Softgel, Vista) Meridian Swift (FX, FX for Her, FX Nano, FX Nano for Her) Swift (FX Bella, FX Bella Gray, LT, Mirage, Nano) Air Fit, Air Fit for Her Pixi Vented Full Nasal Mask . (Hospital) Non Vented Nasal Mask (Ultra Mirage, Hospital)</p>
Fabricantes	<p>1) Resmed Ltd., 1 Elizabeth Macarthur Dr., Bella Vista NSW 2153, Australia 2) Resmed Corp., 9001 Spectrum Center Blvd. San Diego. CA 92123, Estados Unidos 3) Resmed Germany Inc., Fraunhoferstrasse 16, D-82152, Martinsreid, Alemania 4) Resmed Asia Operations Pty Ltd., 8 Layang Crescent #05-01, Singapur 509016, Singapur</p>	<p>RESMED SA Parc Technologique de Lyon. 292 allée Jacques Monod. Saint-Priest Cedex, Rhone Alpes. 69791, Francia</p> <p>ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista, New South Walles (NSW) Australia 2153</p> <p>ResMed Asia Operations Pty Ltd, 8 Loyang Crescent No 05-01. Singapore, 509016 Singapur</p>



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		<p>ResMed Corp. 9001 Spectrum Center Boulevard. San Diego CA 92123, Estados Unidos</p> <p>RESMED Germany Inc. Fraunhoferstrasse 16, Martisreid, D-82152 Alemania</p> <p>ResMed-Duncan Distribution Center, 110 Hidden Lake Circle, Duncan, SC 29334 Estados Unidos</p> <p>Resmed West Coast Warehouse, 23650 Brodaiea, Moreno Valley, CA 92553, Estados Unidos</p> <p>RESMED MOTOR TECHNOLOGIES INC. 9540 De Soto Ave. Chatsworth, CA 91311, Estados Unidos</p> <p>GRUENDELER GMBH KAMEOLSTRASSE, 4 Freudenstadt, Baden- Wurttemberg. 72250. Alemania</p>
Rótulo	Rótulo aprobado por Disposición ANMAT N° 5333/14	Nuevos Rótulos Aprobados a fs. 93
Instrucciones de Uso	Instrucciones de Uso aprobado por Disposición ANMAT N° 5333/14	Nuevas Instrucciones de Uso Aprobados a fs. 94 a 101

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

firma Air Liquide Argentina S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el
RPPTM N° PM-1084-111, en la Ciudad de Buenos Aires, a los
días..... U^o 7 SEP 2015

Expediente N° 1-47-3110-002444/14-6

DISPOSICIÓN N°


6965

↓

Ing ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

6965

01 SEP 2015

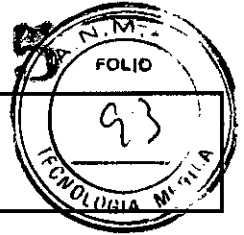

RESMED

Mascaras NASALES
PROYECTO DE ROTULO

Importado por:

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
AV. EVA PERON 6802/78/98/6902/98 Y GUAMINI 3300 DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA.

RESMED

Fabricado por:

RESMED SA
PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON. 292 ALLEE
JACQUES MONOD. SAINT-PRIEST CEDEX, RHONE
ALPES. FRANCE 69791 FRANCIA.

RESMED LTD.
1 ELIZABETH MACARTHUR DRIVE, BELLA VISTA NEW
SOUTH WALLEES 2153, AUSTRALIA.

RESMED ASIA OPERATIONS PTY LTD.
8 LOYANG CRESCENT NO. 05-01 SINGAPORE,
SINGAPORE 509016. SINGAPUR

RESMED CORP.
9001 SPECTRUM CENTER BOULEVARD. SAN DIEGO. CA
92123. ESTADOS UNIDOS

RESMED GERMANY INC.
FRAUNHOFERSTRASSE 16, MARTINSREID, BAYERN,
GERMANY, D-82152, ALEMANIA

RESMED-DUNCAN DISTRIBUTION CENTER
110 HIDDEN LAKE CIRCLE, DUNCAN, SC 29123, ESTADOS
UNIDOS

RESMED WEST COAST WAREHOUSE
23650 BRODIAEA, MORENO VALLEY, CA 92553,
ESTADOS UNIDOS

RESMED MOTOR TECHNOLOGIES INC.
9540 DE SOTO AVE. CHATSWORTH, CA 91311, ESTADOS
UNIDOS

GRUENDELER GMBH
KAMEOLSTRASSE 4 FREUDENSTADT, BADEN-
WURTTENBERG. GERMANY 72250. ALEMANIA.

Máscara NASAL

Modelo: _____

Ref: _____

LOT XXXXXXX



Producto NO ESTERIL - REUTILIZABLE. DESINFECTAR SEGUN
INSTRUCCIONES ADJUNTAS. NO ESTERILIZAR POR EtO O EN AUTOCLAVE

No exponer a luz del sol directa


Bioing. JUAN CAMEN FORTE - Matricula COPITEC I-6127.

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Autorizado por ANMAT PM-1084-111

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
Ing. Juan Luis Camenforte
DIRECTOR TECNICO
Mat. Nº. I - 6127

6965

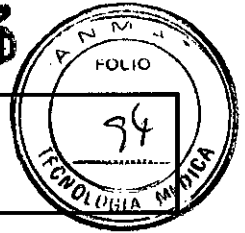

RESMED

Mascaras NASALES
INSTRUCCIONES DE USO

Importado por:
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
AV. EVA PERON 6802/78/98/6902/98 Y GUAMINI 3300 DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA.

RESMED

Fabricado por:
RESMED SA
PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON. 292 ALLEE
JACQUES MONOD. SAINT-PRIEST CEDEX, RHONE
ALPES. FRANCE 69791 FRANCIA.

RESMED LTD.
1 ELIZABETH MACARTHUR DRIVE, BELLA VISTA NEW
SOUTH WALES 2153, AUSTRALIA.

RESMED ASIA OPERATIONS PTY LTD.
8 LOYANG CRESCENT NO. 05-01 SINGAPORE,
SINGAPORE 509016. SINGAPUR

RESMED CORP.
9001 SPECTRUM CENTER BOULEVARD. SAN DIEGO. CA
92123. ESTADOS UNIDOS

RESMED GERMANY INC.
FRAUNHOFERSTRASSE 16, MARTINSREID, BAYERN,
GERMANY, D-82152, ALEMANIA

RESMED-DUNCAN DISTRIBUTION CENTER
110 HIDDEN LAKE CIRCLE, DUNCAN, SC 29123, ESTADOS
UNIDOS

RESMED WEST COAST WAREHOUSE
23650 BRODIAEA, MORENO VALLEY, CA 92553,
ESTADOS UNIDOS

RESMED MOTOR TECHNOLOGIES INC.
9540 DE SOTO AVE. CHATSWORTH, CA 91311, ESTADOS
UNIDOS

GRUENDELER GMBH
KAMEOLSTRASSE 4 FREUDENSTADT, BADEN-
WURTTENBERG. GERMANY 72250. ALEMANIA.

Máscara NASAL

Modelo: _____



Producto **NO ESTERIL - REUTILIZABLE. DESINFECTAR SEGUN**
INSTRUCCIONES ADJUNTAS. NO ESTERILIZAR POR ETO O EN AUTOCLAVE

No exponer a luz del sol directa

Bioing. JUAN CAMEN FORTE - Matricula COPITEC I-6127.

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Autorizado por ANMAT PM-1084-111

Gracias por elegir la mascarilla RESMED, la cual canaliza el flujo de aire de modo no invasivo a un paciente, con o sin oxígeno suplementario.

Uso indicado

Las mascarillas nasales están diseñadas para dirigir, de forma no invasiva, un flujo de aire generado por un dispositivo de presión positiva (CPAP o Binivel) hacia las vías respiratorias del paciente. Pueden utilizarse, tanto de forma domiciliaria como en entorno hospitalario, en más de un paciente.

ADVERTENCIAS

- Esta mascarilla no debe ser utilizada sin supervisión calificada cuando los pacientes no sean capaces de retirarla por sí mismos.



AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
Ing. Juan Luis Camenforte
DIRECTOR TECNICO
Mat. N.º I- 6127

696



Mascaras NASALES
INSTRUCCIONES DE USO

- Esta mascarilla no debe ser usada en pacientes cuyos reflejos laríngeos estén alterados o que padezcan otras afecciones que los predispongan a la aspiración en caso de regurgitación o vómitos.
- No se coloque la mascarilla a menos que el respirador esté encendido y funcionando correctamente.
- A un caudal fijo de oxígeno suplementario (si este se utiliza), la concentración de oxígeno inhalado variará según los valores de presión programados, el ritmo respiratorio del paciente, el tamaño de mascarilla elegido y el caudal de fuga.
- Si se utiliza oxígeno con el respirador, el flujo de oxígeno debe apagarse cuando el respirador no esté funcionando, para evitar que el oxígeno no utilizado se acumule dentro del equipo, lo que constituiría un riesgo de incendio.
- Deje de utilizar esta mascarilla si presenta CUALQUIER reacción adversa a su utilización, y consulte a su médico o especialista de sueño.
- Utilizar una mascarilla puede provocar dolor en los dientes o muelas, en las encías o en la mandíbula, o agravar una afección dental ya existente. Si se presentan síntomas, consulte a su médico o dentista.
- Quite todo del embalaje antes de utilizar la mascarilla.
- Asegúrese de que las fundas blandas estén colocadas en todo momento durante la utilización de la mascarilla.

Utilización de la mascarilla

Colocación

Antes de colocarse la mascarilla, retire el soporte del armazón elástico de la parte posterior de la mascarilla y guárdelo para usarlo en el futuro.

El presente manual posee una sección con figuras que ilustran los pasos que se deben seguir para colocar la mascarilla y obtener el mejor ajuste y comodidad al utilizarla.

Pasos de colocación


1. Deje desabrochados los dos broches inferiores del arnés, y coloque la mascarilla en una posición inclinada contra su rostro, apoyando primero la parte superior de la almohadilla sobre el caballete.
1. Mantenga la parte superior de la mascarilla apoyada en su sitio, y empuje la mitad inferior de la mascarilla contra el rostro, de modo que quede apoyada a mitad de camino entre el labio inferior y el mentón.
2. Sostenga la mascarilla con firmeza contra el rostro y póngase el arnés tirando de él por encima de la cabeza.
3. Pase las correas inferiores por debajo de las orejas y abroche el arnés en la parte inferior del armazón elástico.
4. Quite el Velcro®, tire de las correas superiores del arnés de manera pareja hasta que queden cómodas y firmes, y vuelva a ajustar el Velcro.
5. Repita el paso 5 con las correas inferiores del arnés.

Revisión del arnés y de la almohadilla

- Compruebe que el arnés esté colocado en la posición correcta. Consulte las figuras que ilustran la revisión del arnés en el presente manual.

✓

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
Ing. Juan Luis Camenforte
DIRECTOR TECNICO
Mat. N° 15127

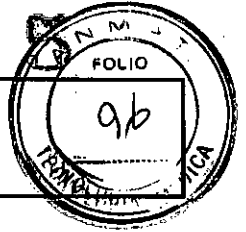**RESMED****Mascaras NASALES
INSTRUCCIONES DE USO**

- La almohadilla de la Quattro FX está diseñada para apoyarse a mitad de camino sobre el caballete. Consulte las figuras que ilustran la revisión de la almohadilla para colocarla en la posición correcta.

Cómo retirar la mascarilla

Para quitarse la mascarilla, abra los broches inferiores del arnés, y tire del arnés y de la mascarilla hacia arriba, por encima de la cabeza.

Desmontaje

Antes de desmontar la mascarilla, desconecte el tubo de aire y abra los broches inferiores del arnés para separarlos del armazón elástico. Consulte las figuras que ilustran el desmontaje en el presente manual.

Pasos para desmontar la mascarilla

1. Retire el codo de la mascarilla.
2. Tire con suavidad del armazón elástico para separarlo del armazón. Retire las fundas blandas del armazón elástico.
3. Separe con suavidad la almohadilla del armazón.
4. Retire el tapón de los puertos.

Montaje


Consulte las figuras que ilustran el montaje en el presente manual.

Pasos para montar la mascarilla

1. Vuelva a colocar el tapón de los puertos.
1. Coloque la almohadilla en la ranura del armazón. Coloque la parte superior en primer lugar, y luego vaya colocando el resto empujando la almohadilla hacia dentro del armazón.
2. Asegúrese de que la almohadilla no quede torcida ni deformada en ninguna parte del armazón.
3. Vuelva a colocar las fundas blandas sobre el armazón elástico, y alinee el armazón elástico con el armazón.
4. Comenzando por la parte superior, empuje el armazón elástico con suavidad contra el armazón, hasta que encaje en su lugar.
5. Empuje con suavidad ambos lados de la parte inferior del armazón elástico contra el armazón, hasta que encajen en su lugar.
6. Vuelva a colocar el codo en el conjunto de la mascarilla.

Limpieza de la mascarilla en el domicilio

La mascarilla y el arnés sólo pueden lavarse a mano, frotándolos suavemente en agua caliente (aproximadamente 30 °C/86 °F), con un jabón suave. Hay que enjuagar bien todas las piezas con agua potable y dejarlas secar al aire, sin exponerlas a la luz solar directa.

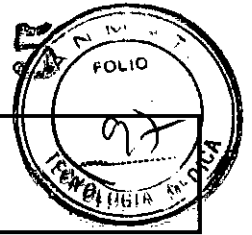**RESMED****Mascaras NASALES
INSTRUCCIONES DE USO****Diariamente/después de cada uso:**

- Para optimizar el sellado de la mascarilla, hay que eliminar la grasa facial de la almohadilla luego de utilizarla.
- Lave a mano las piezas de la mascarilla por separado (excluyendo el arnés).

Semanalmente:

- Lave a mano el arnés. Se puede lavar sin desmontar.


ADVERTENCIA

- No utilice soluciones aromáticas ni aceites perfumados (como eucalipto o aceites esenciales), lejía, alcohol o productos de fuerte olor (p. ej.: cítricos) para limpiar ninguna de las piezas de la mascarilla. Los vapores residuales de estas soluciones pueden inhalarse si no se enjuagan por completo. También pueden dañar la mascarilla y causar grietas.

PRECAUCIÓN

- Si advierte algún signo de deterioro (como grietas, rajaduras, roturas, etc.) en una de las piezas del sistema, dicha pieza debe desecharse y sustituirse por una nueva.
- Evite conectar directamente productos de PVC flexible (p. ej. tubos de PVC) a cualquier pieza de la mascarilla. El PVC flexible contiene elementos que pueden afectar los materiales de la mascarilla, y pueden hacer que las piezas se agrieten o se rompan.

|

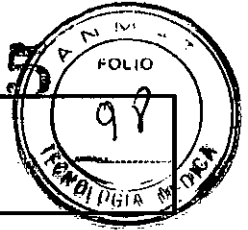

Solución de problemas

Problema/Causa posible Solución

La mascarilla es incómoda

Las correas del arnés están muy ajustadas.

La membrana de la almohadilla está diseñada para inflarse contra el rostro, a efectos de brindar un sellado cómodo sin que el arnés quede muy tirante. Ajuste las correas de modo parejo. Compruebe que las correas del arnés no estén demasiado tirantes y que la almohadilla no esté arrugada o aplastada.

Es posible que el tamaño de la mascarilla no sea el adecuado.

Hable con el médico para que compruebe cuál es el tamaño que se ajusta a su rostro con el modelo de ajuste. Tenga en cuenta que los tamaños de las diferentes mascarillas no siempre coinciden. La almohadilla de la Quattro FX está diseñada para apoyarse a mitad de camino sobre el caballete.

El arnés está tocando la parte superior de las orejas.

Retire la mascarilla y vuelva a colocarla según las instrucciones. Compruebe que las correas superiores e inferiores del arnés estén colocadas en la posición correcta. Compruebe que la lengüeta de Velcro esté correctamente alineada con el material del arnés y que no esté tocando la parte superior de la oreja.

La almohadilla se desplaza hacia arriba por el rostro durante el uso.

Compruebe que la posición del arnés sea la que se indica en las instrucciones. El arnés no debe quedar demasiado atrás en la cabeza. Es posible que el tamaño del arnés no sea el adecuado. Si el problema persiste, hable con el médico.

El armazón elástico está colocado muy cerca de los ojos.

Es posible que el tamaño de la mascarilla no sea el adecuado. Hable con el médico para que compruebe cuál es el tamaño que se ajusta a su rostro con el modelo de ajuste.


La mascarilla es muy ruidosa

El tapón de los puertos o el codo están mal insertados.

Retire el tapón de los puertos y el codo de la mascarilla, y vuelva a montarlos según las instrucciones.

k

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
Ing. Juan Luis Camenforte
DIRECTOR TÉCNICO
MST N° I-6127

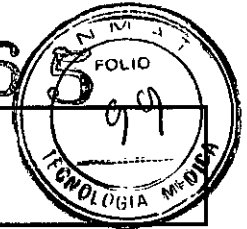

La mascarilla presenta fugas alrededor del rostro

La membrana de la almohadilla está arrugada o doblada.

Apague el equipo y quítese la mascarilla. Vuelva a colocarse la mascarilla según las instrucciones. Asegúrese de colocar la almohadilla correctamente sobre el rostro antes de tirar del arnés por encima de la cabeza. No deslice la mascarilla hacia abajo por el rostro al colocarla, dado que esto podría doblar o enrollar la almohadilla.

La almohadilla no está correctamente insertada en el armazón.

Retire la almohadilla del armazón y vuelva a insertarla comenzando por la parte superior. Alinee la parte saliente de la almohadilla con la parte cóncava situada en la parte superior del armazón. Compruebe que las marcas de alineación situadas en las esquinas inferiores de la almohadilla estén alineadas con las muescas del armazón. Compruebe que la membrana de la almohadilla esté alisada antes de volver a colocarla. Si el problema persiste, hable con el médico.

Es posible que el tamaño de la mascarilla no sea el adecuado.

Hable con el médico para que compruebe cuál es el tamaño que se ajusta a su rostro con el modelo de ajuste. Tenga en cuenta que los tamaños de las diferentes mascarillas no siempre coinciden. La almohadilla de la Quattro FX está diseñada para apoyarse a mitad de camino sobre el caballete.

El armazón elástico no está bien colocado en el armazón.

Retire el armazón elástico del armazón, y luego vuelva a ensamblarlos conforme a las instrucciones.

Notas:

- El sistema de la mascarilla no contiene materiales de látex, PVC o DEHP.
- El fabricante se reserva el derecho de modificar las presentes especificaciones sin previo aviso.

Almacenamiento

Asegúrese de que la mascarilla esté limpia y seca antes de guardarla durante cualquier período de tiempo. Guarde la mascarilla en un lugar seco, fuera de la luz solar directa. Para proteger la mascarilla de la mejor manera posible, asegúrese de que el soporte del armazón elástico esté colocado cuando vaya a trasladarla.

Eliminación







La mascarilla no contiene ninguna sustancia peligrosa y puede eliminarse con la basura doméstica habitual.

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
Ing. Juan Luis Camenforte
DIRECTOR TECNICO
Mat. N°. I-6127






Figuras e ilustraciones




Colocación

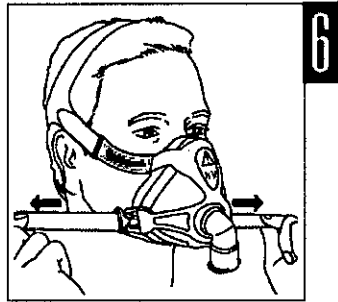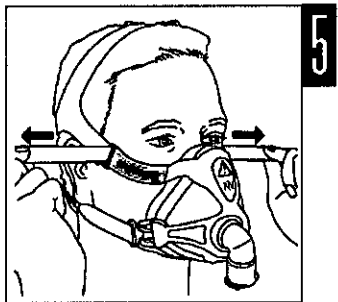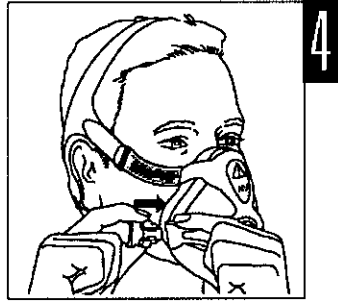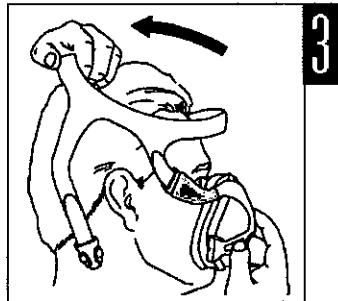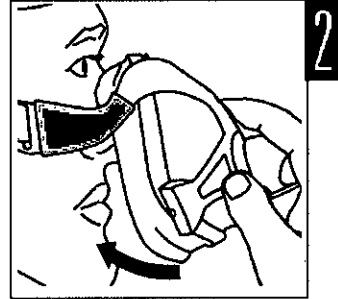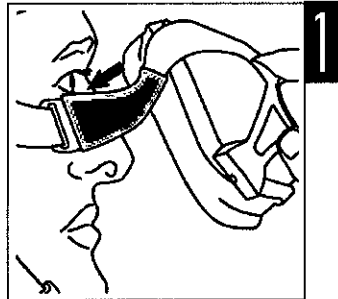


Posición del arnés

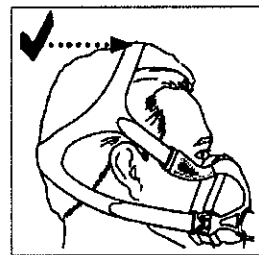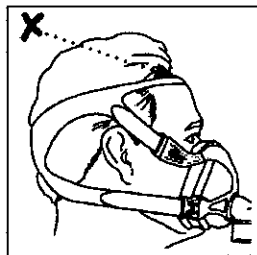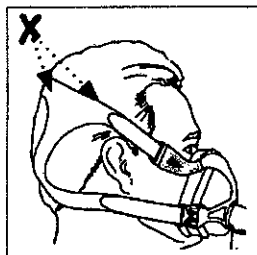

Revisión de la almohadilla

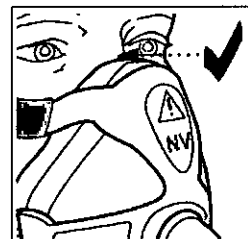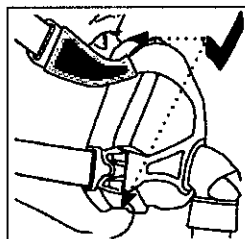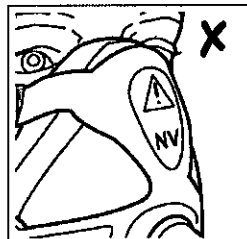


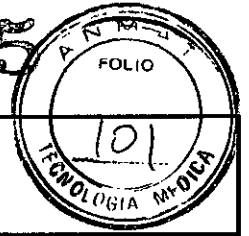


RESMED

Mascaras NASALES
INSTRUCCIONES DE USO

Desmontaje

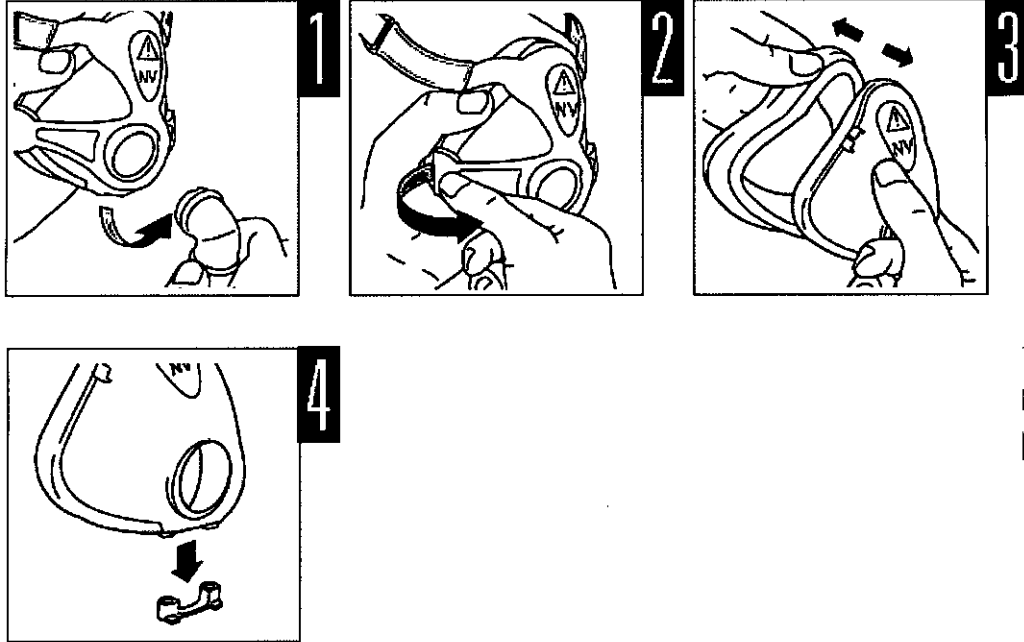

Montaje

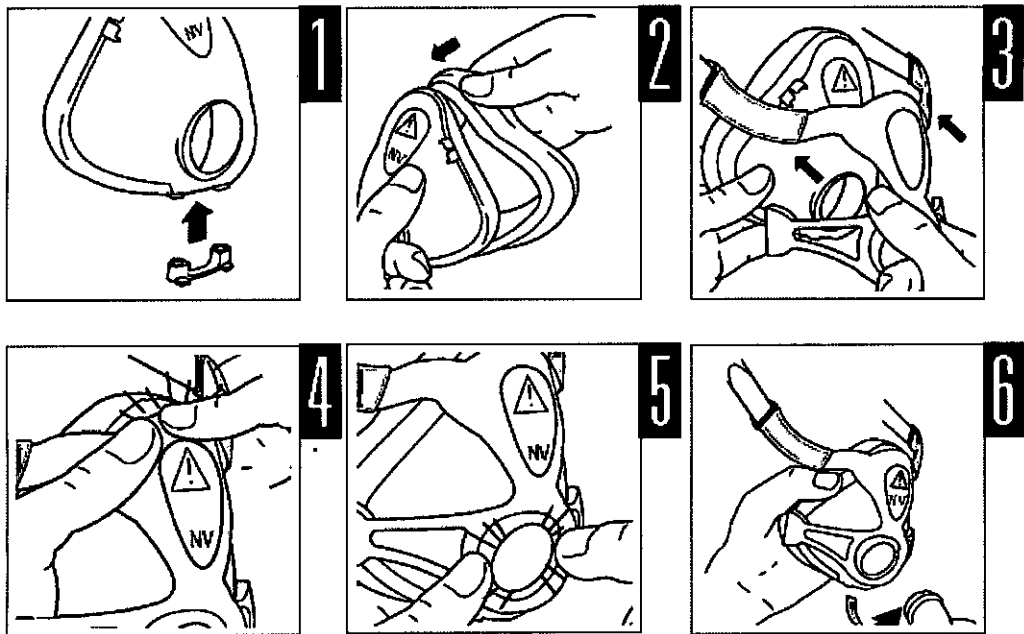

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
Ing. Juan Luis Camentarte
DIRECTOR TECNICO
Mat. N° 6127