



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N° 10608

BUENOS AIRES, 23 SET. 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-2808-16-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones AIDIN S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16.463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

E
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N° 10608

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca COOK, nombre descriptivo ESPIRAL DE EMBOLIZACIÓN, nombre técnico PRÓTESIS PARA EMBOLIZACIÓN, INTRAVASCULAR de acuerdo con lo solicitado por AIDIN S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 12 y 13 a 16, respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-559-699, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscribáse en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entradas, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N°

10608

de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-2808-16-8

DISPOSICIÓN N°


- 10608

MQ .

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

23 SET. 2016

REFOLIADO N° 12
Direc. Tecnología Médica

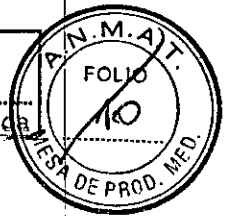

Rótulo

Espiral de Embolización
Marca: Cook

70608

Modelo: Espiral de Embolización

REF: (según corresponda)

Medidas: (según corresponda)

Fabricado por:
Cook Incorporated
750 Daniels Way, Bloomington
IN 47404, EE.UU

Importado por:
AIDIN S.R.L.
Doblas 1508. (1424)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Argentina

Producto estéril. Esterilizado por óxido de etileno
Producto de un solo uso

Lote: _____
Fecha de fabricación: AAAA/ MM
Fecha de caducidad: AAAA/ MM

No utilizar si el envase está abierto o dañado

Condiciones de transporte y almacenamiento:
Almacénelo en un lugar fresco, seco y oscuro.
Evite la exposición prolongada a la luz.

Modo de uso, Advertencias y Precauciones: Ver Instrucciones de uso.

"Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias"

Director Técnico: Farm. Martha de Aurteneche MN 8336


Autorizado por la ANMAT PM-559-699

AIDIN S.R.L.
ANDRÉS WATEMBERG
APODERADO

MARtha ELYNA de AURteneche
FARMACEUTICA - M.N. 8336
DIRECTORA TECNICA

E

10608

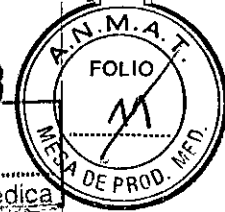

REFOLIADO N° 13
Direc. Tecnología Médica

Instrucciones de Uso
Espiral de Embolización
Marca: Cook

Modelo: Espiral de Embolización

REF: (según corresponda)

Medidas: (según corresponda)

Fabricado por:
Cook Incorporated
750 Daniels Way, Bloomington
IN 47404, EE.UU

Importado por:
AIDIN S.R.L.
Doblas 1508. (1424)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Argentina

Producto estéril. Esterilizado por óxido de etileno
Producto de un solo uso

Lote: _____
Fecha de fabricación: AAAA/ MM
Fecha de caducidad: AAAA/ MM

No utilizar si el envase está abierto o dañado

Condiciones de transporte y almacenamiento:
Almacénelo en un lugar fresco, seco y oscuro.
Evite la exposición prolongada a la luz.

Modo de uso, Advertencias y Precauciones: Ver Instrucciones de uso.

"Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias"

Director Técnico: Farm. Martha de Aurteneche MN 8336

Autorizado por la ANMAT PM-559-699


AIDIN S.R.L.
ANDRES WATEMBERG
APODERADO

MARtha ELYNA de AURteneche
FARMACEUTICA - M.N. 8336
DIRECTORA TECNICA

(F)

10608

REFOLIADO N° 14
Direc. Tecnología Médica

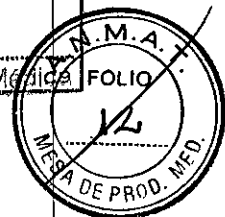

INDICACIONES DE USO

Los espirales de Embolización (MWCE-/-) están indicadas para procedimientos de embolización de vasos arteriales y venosos.

El producto está concebido para que lo utilicen médicos con formación y experiencia en técnicas de embolización. Deben emplearse las técnicas habituales de colocación de vainas de acceso vascular, catéteres angiográficos y guías.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS


- La colocación de espirales de embolización debe llevarse a cabo con especial cuidado. Las espirales no deben dejarse demasiado cerca de las entradas de arterias y, si es posible, deben entrecruzarse con las espirales colocadas anteriormente. Debe quedar un flujo sanguíneo arterial mínimo pero suficiente para mantener las espirales contra las espirales colocadas anteriormente, hasta que un coágulo sólido asegure una fijación permanente. El propósito de estas recomendaciones es reducir al mínimo la posibilidad de que queden espirales sueltas que se salgan de su posición y obstruyan un canal arterial normal y esencial.
- No se recomienda utilizar las espirales de embolización con catéteres de poliuretano ni con catéteres que tengan orificios laterales. Si se utiliza un catéter con orificios laterales, el émbolo puede alojarse en el orificio lateral o pasar inadvertidamente a través de él. El uso de un catéter de poliuretano también puede hacer que el émbolo se aloje en el interior del catéter.
- Si el despliegue de la espiral de embolización presenta dificultades, repita el procedimiento de liberación de la espiral. Si persisten las dificultades, extraiga conjuntamente la guía, la espiral y el catéter angiográfico

PRECAUCIONES

- Antes de la embolización, haga una angiografía para confirmar que el catéter esté en la posición correcta.
- Antes de la introducción de la espiral de embolización, lave el catéter angiográfico con solución salina

AIDIN S.R.L.
ANDRES WATEMBERG
APODERADO

MARTHA ELYNA de AURTENECHÉ
FARMACEUTICA - M.N. 8336
DIRECTORA TECNICA

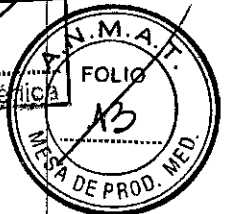

RECOMENDACIONES SOBRE EL PRODUCTO


Tamaño de la espiral Diámetro	Diámetro recomendado de la guía	Tamaño recomendado del catéter
0,025 pulgadas (0,64 mm)	0,025 pulgadas (0,64 mm)	SCR3.0B
0,035 pulgadas (0,89 mm)	0,035 pulgadas (0,89 mm)	HNB5.0 P5.0B
0,038 pulgadas (0,97 mm)	0,038 pulgadas (0,97 mm)	P5.0B SCBR5.0
0,052 pulgadas (1,32 mm)	0,038 pulgadas (0,97 mm)	HNB7.0-NT

AIDIA S.R.L.
ANDRES WATERBERG
APODERADO

MARIANA ELYNA de AURTENECHE
FARMACEUTICA - M.N. 8336
DIRECTORA TECNICA

E 10608

REFOLIADO N° 16
Dircc. Tecnología Médica

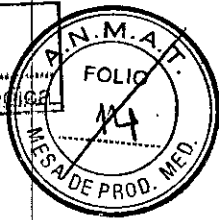


INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de la embolización, haga una angiografía para confirmar que el catéter esté en la posición óptima.
2. Sujete firmemente el cartucho de carga con los dedos pulgar e índice. Introduzca el extremo metálico del cartucho de carga en la base del conector del catéter.
3. Mientras mantiene la posición del cartucho, haga avanzar la parte rígida de la guía en el interior de la cánula de carga. Haga avanzar la espiral por los primeros 20-30 centímetros del catéter angiográfico.
4. Extraiga la guía y el cartucho de carga.
5. Con la punta flexible de la guía, haga avanzar la espiral de embolización hasta la punta del catéter. Compruebe la posición del catéter angiográfico antes del despliegue.
6. Despliegue la espiral haciendo avanzar la guía hasta que sobrepase la punta del catéter.
7. Haga una angiografía final para confirmar la posición de la espiral dentro del vaso que se quiera tratar.

PRESENTACIÓN

El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases tipo pouch **individuales** de apertura pelable cuyo reverso es de Tyvek y el anverso una lámina de polietileno/poliéster transparente (envase primario). Este envase provee la barrera estéril.

Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril. Almacénalo en un lugar fresco, seco y oscuro. Evite la exposición prolongada a la luz. Tras extraerlo del envase, inspeccione el producto para asegurarse de que no haya sufrido ningún daño.

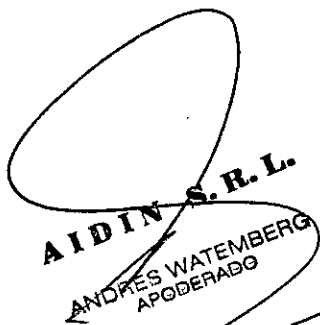
AIDIN S. R. L.
ANDRES WATERBERG
APODERADO


MARTHA ELYNA de AURTENECHÉ
FARMACÉUTICA - M.N. 8336
DIRECTORA TÉCNICA



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

ANEXO

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-47-3110-2808-16-8

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° 10600 y de acuerdo con lo solicitado por AIDIN S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: ESPIRAL DE EMBOLIZACIÓN

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-034 PRÓTESIS PARA EMBOLIZACIÓN, INTRAVASCULAR

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): COOK

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s: indicados para procedimientos de embolización de vasos arteriales y venosos

Modelo/s:

MWCE-25-1.2-2 ESPIRAL DE EMBOLIZACION

MWCE-25-2-3 ESPIRAL DE EMBOLIZACION

MWCE-25-2-5 ESPIRAL DE EMBOLIZACION

MWCE-25-2.5-2 ESPIRAL DE EMBOLIZACION

MWCE-25-3-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-25-3-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-25-3-4	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-25-3-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-25-4-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-25-5-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-1-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-1-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-1.2-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-1.5-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-10-10	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-10-12	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-10-15	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-10-4	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-10-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-10-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-12-10	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-12-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-14-12	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-14-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-14-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-14-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-15-10	ESPIRAL DE EMBOLIZACION

E *n*



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

MWCE-35-15-12	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-15-15	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-15-20	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-2-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-2-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-2-4	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-2-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-2-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-2.5-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-3-10	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-3-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-3-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-3-4	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-3-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-3-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-3-7	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-3-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-4-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-4-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-4-4	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-4-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-4-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION

MWCE-35-4-7	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-4-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-5-10	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-5-12	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-5-15	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-5-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-5-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-5-4	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-5-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-5-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-5-7	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-5-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-36-6-10	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-6-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-6-4	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-6-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-6-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-7-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-8-10	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-8-12	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-8-15	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-8-4	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-8-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION

5
1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

MWCE-35-8-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-35-8-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-1-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-1.2-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-10-10	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-10-12	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-10-15	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-10-20	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-10-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-10-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-10-7	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-10-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-12-10	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-12-14	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-12-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-12-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-13-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-15-12	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-15-15	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-15-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-15-20	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-15-25	ESPIRAL DE EMBOLIZACION

MWCE-38-15-30	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-15-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-16-45	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-2-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-2-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-2-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-2-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-2.5-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-3-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-3-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-3-4	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-3-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-3-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-4-12	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-4-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-4-4	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-4-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-4-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-4-7	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-5-10	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-5-12	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-5-15	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-5-2	ESPIRAL DE EMBOLIZACION





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

MWCE-38-5-20	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-5-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-5-4	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-5-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-5-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-5-7	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-5-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-6-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-6-4	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-6-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-6-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-6-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-6.5-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-7-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-8-10	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-8-12	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-8-15	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-8-3	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-8-4	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-8-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-8-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-38-8-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION

MWCE-38-9-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-10-10	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-10-15	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-10-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-10-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-15-10	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-15-12	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-15-15	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-15-20	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-5-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-5-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-5-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-6-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-6-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-8-5	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-8-6	ESPIRAL DE EMBOLIZACION
MWCE-52-8-8	ESPIRAL DE EMBOLIZACION

Período de vida útil: 5 años.

Forma de presentación: por unidad.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante:

COOK INCORPORATED

Σ

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

Lugar/es de elaboración:

750 Daniels Way, Bloomington IN 47404, EE.UU

Se extiende a AIDIN S.R.L. el Certificado de Autorización e Inscripción del PM-559-699, en la Ciudad de Buenos Aires, a **23 SET. 2016**, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº

10608

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.