



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

## DISPOSICIÓN N° 6311

BUENOS AIRES, 16 SEP 2011

VISTO el Expediente N° 1-47-20925-10-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

### CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Dental Medrano S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso I) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca PARAPOST, nombre descriptivo: sistema de postes, taladros y pines endodónticos y nombre técnico postes para el canal de la raíz, de acuerdo a lo solicitado, por Dental Medrano S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 12 A 20 Y 6 A 11 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-235-105, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

**DISPOSICIÓN N° 6311**

"2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III Contraentrega del Original Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-20925-10-2

DISPOSICIÓN N° **6311**

ro

**Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.**



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas,*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T*

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO  
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° .....6311.....

Nombre descriptivo: sistema de postes, taladros y pines endodónticos

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-202 postes para el canal de la raíz.

Marca del producto médico: PARAPOST

Sistemas de taladros y postes endodónticos y sus accesorios

Sistemas de kits que incluyen postes y taladros en distintos calibres más sus accesorios.

Modelos:

XP System kit

-Casting Technique kit (técnica de colado). Incluye postes de impresión, temporarios y calcinables.

-One Office-Visit Technique: Incluye Postes de aleación de acero inoxidable.

XH System kit, XT System kit:

-Incluye Postes de aleación de Titanio.

FIBER LUX; FIBER WHITE Kits

-Incluye Postes de fibra (lisos)

TAPER LUX kit

-Incluye Postes de fibra (surcados)-Todos los postes, taladros y accesorios como repuestos (Refill) en unidades y/o múltiples

\* TENAX

Sistema completo (Complete kit) de taladros y postes endodónticos para todas las técnicas y sus accesorios.

Taladros (Drills) en unidades y/o múltiples de diversas medidas.

-Tenax Drills; Fiber Trans Drills

Sistemas en kit que incluyen postes y taladros en distintos calibres más sus accesorios:



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas,*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

-Complete; Introductory; One Office-Visit Complete; One Office-Visit Introductory; Casting Technique; Casting Technique Introductory; Fiber White Titanio Introductory; Fiber Trans

\* UNITY

Sistema de Pines y Taladros en material de acero inoxidable y/o Titanio.

Sistemas en Kit completo y de repuesto, Mini Unity completo.

Clase de Riesgo: II

Indicación/es autorizada/s: sistema de anclaje intrarradicular para sostener la restauración dental

Período de vida útil: 5 años

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Coltene/ Whaledent Inc.

Lugar/es de elaboración: 235 Ascot Parkway, Cuyahoga Falls, OH 44223,USA

Expediente Nº 1-47-20925-10-2

DISPOSICIÓN Nº **6311**

ro

**Dr. OTTO A. ORSINGER**  
**SUB-INTERVENTOR**  
**A.N.M.A.T.**



"2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas,*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del  
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

.....**6311**.....

**Dr. OTTO A. ORSINGER**  
**SUB-INTERVENTOR**  
**A.N.M.A.T.**

**Dental Medrano S.A.**

Paraguay 3026 (C1425BRL) Ciudad de Buenos Aires  
 Tel: (011) 4962-9000 / Fax: (011) 4962-1212  
 e-mail: [lab@dental-medrano.com.ar](mailto:lab@dental-medrano.com.ar)

**ANEXO III B****PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO**
**PARAPOST: XT / XP / XH / Fiber White / Fiber Lux / Taper Lux**
**INDICACIONES**

Sistemas de postes endodónticos en aleación de titanio, de acero inoxidable, de aleación de oro, de fibra de vidrio o de plástico calcinable, y sus taladros en aleación de titanio o de acero inoxidable para utilizar en la técnica de una sola visita y técnicas de colado directa e indirecta, para lograr restauraciones fáciles y confiables mediante la técnica de endopostes y muñones.

**ParaPost® X™ System:** Una completa familia de postes para cualquier situación clínica.

- Sistema normalizado con siete tamaños incluyendo dos tamaños intermedios
- Taladros calibrados (ejercicio de profundidad) para la preparación precisa del conducto

**ParaPost® XT™:** aleación de Titanio, con cabeza con retenciones que facilitan la construcción del muñón en una sola visita al consultorio. Ideales para la construcción de muñones de composite / ionómeros de vidrio, que requieran una retención y seguridad extras.

**ParaPost® XP™:** aleación de Titanio o Acero inoxidable, de cabeza plana para la construcción de muñones en una sola visita al consultorio. Ideal para la construcción de muñones en situaciones de más de una raíz. Para usar en colados directos / indirectos y con postes de aleación de oro.

**ParaPost® XH™:** aleación de Titanio, de cabeza inferior redondeada para la posterior construcción del núcleo en una sola visita al consultorio.

**ParaPost® Fiber White / Fiber Lux / Taper Lux:** Postes de fibra de vidrio reforzados con resina para restauraciones estéticas libres de metal. Elasticidad similar a la dentina similar.

**Fiber White:** unión química entre Fiber White y el muñón del composite. El resultado es una restauración cohesiva.

**Fiber Lux:** translúcidos, posibilitan el uso de cementos y materiales de fotocurado.

**Taper Lux:** translúcidos, diseñados para canales radiculares estrechos

**INSTRUCCIONES DE USO****Técnica de una sola visita**

1. Luego del tratamiento de endodoncia, se inicia la preparación cilíndrica del conducto mediante el taladro ParaPost más pequeño, determinando ahora la profundidad total de preparación.
2. El empleo secuencial ascendiente de los taladros ParaPost permite preparar con seguridad el conducto al diámetro indicado, manteniendo la profundidad inicial.
3. El empleo de pines Unity o la ejecución de una caja antirotacional anula cualquier tendencia a la rotación.
4. Prueba de poste ParaPost correspondiente al último diámetro de taladro utilizado. Debe entrar libremente; si es preciso, se marca el poste para acortarlo (fuera de la boca).
5. Luego de cementado el poste se adapta cuidadosamente una banda para matriz y se lleva a cabo un muñón de amalgama o composite.

P/DENTAL MEDRANO S.A.  
*Marta D. de Etchecoin*  
 MARTA D. de ETCHECOIN  
 ABOGADA  
 D.N.I. 4.095.467

*Dr. Armanio Babahektian*  
 Dr. ARMANIO BABAHEKTIAN  
 BIOQUÍMICO - FARMACÉUTICO  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 DENTAL MEDRANO S.A.


**Dental Medrano S.A.**

Paraguay 3026 (C1425BRL) Ciudad de Buenos Aires  
 Tel: (011) 4962-9000 / Fax: (011) 4962-1212  
 e-mail: [lab@dental-medrano.com.ar](mailto:lab@dental-medrano.com.ar)


**Técnica directa de colado**

1. Prepare el conducto.
2. Inserte el Pemo Calcinable.
3. Haga el diseño en resina.
4. Fabrique una corona provisional usando un Pemo Provisional.
5. Cubra con material de revestimiento y cuele (procedimiento de laboratorio)
6. Cemente la restauración final

**Técnica indirecta de colado**

1. Prepare el conducto
2. Tome una impresión usando un Pemo de Impresión
3. Fabrique una corona provisional usando un Pemo Provisional
4. Vacíe el modelo maestro
5. Sustituya por un Pemo Calcinable, cubra con material de revestimiento y cuele (procedimiento de laboratorio)
6. Cemente la restauración final.

**Limpieza y Esterilización:**

**Fresas:** Antes de cada uso, elimine los residuos en un baño ultrasónico o a mano, frotándolas con un cepillo; enjuáguelas y séquelas bien. Coloque las fresas, con un indicador de esterilización, en una bolsa para autoclave y séllela. Esterilícelo en gravedad a 132 °C durante 12 minutos. Las bolsas de esterilización no deben tocar las paredes del autoclave. Una vez que el monitor de esterilización indique que la esterilización ha concluido, ponga la bolsa del autoclave, con las fresas adentro, en un lugar de almacenamiento hasta el momento de usarlas. Para descontaminarlas, sumérgalas en una solución de alcohol isopropílico al 70% durante 10 minutos.

**Pemos:** Antes de cada uso, coloque los pemos junto con un indicador de esterilización en una bolsa de autoclave y ciérrela. Esterilícelos en el autoclave a una temperatura entre 130 y 135 °C durante 12 a 15 minutos según los procedimientos habituales.

**Llave de mano Universal:** Esterilizar en autoclave, o con vapor químico.

**OTRAS PRESENTACIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA:**

- Marca UNITY (Pines de acero inoxidable, de Titanio y Taladros de acero inoxidable y Titanio; Kits)
- Marca TENAX (Postes de aleación Titanio, Plastic Burnout, Impression – Temporary, Fiber White, Fiber Trans; Taladros Tenax; Kits)

**USO PROFESIONAL EXCLUSIVO**
**VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**

Elaborado por Coltène/Whaledent Inc. – Cuyahoga Falls – OH – USA.

Importado y Comercializado por **Dental Medrano S.A.**

Paraguay 3026 – Buenos Aires (1425) – Argentina

Tel.: 4962-9000 / e-mail: [info@dental-medrano.com.ar](mailto:info@dental-medrano.com.ar)

Director Técnico: Armando Babahekian – Farmacéutico-Bioquímico Mat. Nº: 4317

Producto autorizado por la ANMAT: PM 235-105

DENTAL MEDRANO S.A.  
 MANTA D. de EFICHESOIM  
 APOCERADA  
 D.N.I. 4.055.497

Dr. ARMANDO BABAHEKIAN  
 BIOQUÍMICO - FARMACÉUTICO  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 DENTAL MEDRANO S.A.



**Dental Medrano S.A.**

Paraguay 3026 (C1425BRL) Ciudad de Buenos Aires  
 Tel: (011) 4962-9000 / Fax: (011) 4962-1212  
 e-mail: [lab@dental-medrano.com.ar](mailto:lab@dental-medrano.com.ar)

**ANEXO III B****PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO****TENAX / TENAX FIBER WHITE / TENAX FIBER TRANS****INDICACIONES****TENAX®**

Sistemas de postes pasivos de acero inoxidable o de aleación de titanio, cilindro-cónicos, para técnicas directas e indirectas de restauración.

Postes temporarios / impresiones de aleación de titanio, Postes plásticos incinerables, Postes de Níquel-Plata.

Codificado por colores en 7 tamaños de acuerdo a ISO

**TENAX® – Fiber White**

Sistemas de postes pasivos de fibra de vidrio y resina, cilindro-cónicos, para técnicas directas e indirectas de restauración con doble surco para *mayor retención mecánica*.

**TENAX® - Fiber Trans**

Sistemas de postes pasivos, translúcidos, que permite el uso de cementos fotopolimerizables. Diseño cónico con estrechos conductos radiculares canales o el diseño en paralelo de los canales normales.

**INSTRUCCIONES DE USO****Técnica de una sola visita (para postes Tenax / Fiber White™ / Fiber Trans™)**

1. Luego del tratamiento de endodoncia, se inicia la preparación cilíndrica del conducto mediante el taladro Tenax más pequeño, determinando ahora la profundidad total de preparación.
2. El empleo secuencial ascendente de los Tenax Diber Drills permite preparar con seguridad el conducto al diámetro indicado, manteniendo la profundidad inicial.
3. Construya una caja antirotacional para anular cualquier tendencia a la rotación.
4. Prueba de poste Tenax correspondiente al último diámetro de taladro utilizado. Debe entrar libremente; si es preciso, se marca el poste para acortarlo (fuera de la boca).
5. Luego del cementado el poste siguiendo las instrucciones del fabricante, adaptar cuidadosamente una banda para matriz y llevar a cabo un muñón de amalgama o composite.

**Técnica directa de colado (para postes Tenax)**

1. Prepare el conducto.
2. Inserte el Perno Calcinable.
3. Haga el diseño en resina.
4. Fabrique una corona provisional usando un Perno Provisional.
5. Cubra con material de revestimiento y cuele (procedimiento de laboratorio)
6. Cemente la restauración final

**Técnica indirecta de colado (para postes Tenax)**

1. Prepare el conducto
2. Tome una impresión usando un Perno de Impresión
3. Fabrique una corona provisional usando un Perno Provisional
4. Vacíe el modelo maestro
5. Sustituya por un Perno Calcinable, cubra con material de revestimiento y cuele (procedimiento de laboratorio)
6. Cemente la restauración final.

DENTAL MEDRANO S.A.

MARTA D. de BICHIGOIN  
 ABOGADA  
 D.N.L. 4.038.497

Dr. ARMANDO RAFAHEKIAN  
 BIQUÍMICO - FARMACÉUTICO  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 DENTAL MEDRANO S.A.



## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

### LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

**Postes:** Limpie todos los postes TENAX en un limpiador ultrasónico durante 5 minutos. Retire y enjuague bien con agua de la canilla; seque con toalla de papel. Coloque el poste o postes en un pequeño recipiente de vidrio tapado y limpio. Añada una solución esterilizante de líquido transparente autorizada por la FDA que contenga un 7,50% de peróxido de hidrógeno y 0,85% de ácido fosfórico.

Deje reposar a temperatura ambiente durante un mínimo de 6 horas pero sin superar 24 horas. Vierta la solución a la pileta y añada agua estéril al recipiente de vidrio que cubre los postes. Agite suavemente la solución durante dos minutos, y después vierta la solución en la pileta y deposite el poste o postes en una esponja estéril, en un recipiente limpio. Ponga la tapa y guarde hasta que esté listo para el uso.

Siga las instrucciones del fabricante de la solución.

**No vuelva a reutilizar la solución - nunca añada solución nueva a la solución utilizada.**

**¡Deseche siempre la solución después de cada uso!**

**Taladros:** Antes de cada uso, retire los residuos ultrasónicamente o a mano frotando con un cepillo: enjuague y seque concienzudamente. Coloque los taladros en un indicador de esterilización, en una bolsa de autoclave, y selle. Esterilice al vapor a 132°C durante 12 minutos. Las bolsas de esterilización no deben tocar las paredes del autoclave. Una vez que el monitor de esterilización indique que se ha conseguido la esterilización, guarde la bolsa de autoclave, con los taladros dentro, hasta que se vayan a utilizar.

**Llave de mano Universal:** Antes de cada uso, retire los residuos ultrasónicamente o a mano frotando con un cepillo. Esterilice siguiendo las instrucciones para los taladros que figuran más arriba.

**Aviso: ¡NO DOBLE LOS POSTES!**

### ALMACENAMIENTO

Mantener los envases bien cerrados a temperatura ambiente

### PRESENTACIONES

TENAX: Kit complete; Postes de impresión; Postes temporarios; Postes plásticos incinerables; Postes de aleación de titanio; Taladros; Repuestos; Accesorios: Taladro iniciador, Llave de mano universal.

TENAX – FIBER WHITE: Kits introductorios; Repuestos

TENAX – FIBER TRANS: Kits introductorios; Taladros; Repuestos

### OTRAS PRESENTACIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA:

- Marca UNITY ( Pines de acero inoxidable, de Titanio y Taladros de acero inoxidable y Titanio; Kits)
- Marca PARAPOST ( Postes de aleación de: Acero Inoxidable, de Titanio, de Oro, o de plástico calcinable; Taladros de Acero Inoxidable o de Titanio; Kits)

### USO PROFESIONAL EXCLUSIVO

### VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Elaborado por Coltène/Whaledent Inc. – Cuyahoga Falls – OH – USA.

Importado y Comercializado por **Dental Medrano S.A.**

Paraguay 3026 – Buenos Aires (1425) – Argentina

Tel.: 4962-9000 / e-mail: [info@dental-medrano.com.ar](mailto:info@dental-medrano.com.ar)

Director Técnico: Armando Babahekian – Farmacéutico-Bioquímico Mat. Nº: 4317

Producto autorizado por la ANMAT: PM 235-105

DENTAL MEDRANO S.A.  
  
**MARTA D. de ETCHEOCOIN**  
 APOICERADA  
 D.N.I. 4.695.497

**Dr. ARMANDO BABAHKIAN**  
 BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 DENTAL MEDRANO S.A.

## Dental Medrano S.A.

Paraguay 3026 (C1425BRL) Ciudad de Buenos Aires  
Tel: (011) 4962-9000 / Fax: (011) 4962-1212  
e-mail: [lab@dental-medrano.com.ar](mailto:lab@dental-medrano.com.ar)



6311



### ANEXO III B

### PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

#### UNITY

#### INDICACIONES

El pin restaurador *Unity* es un poste prefabricado para la construcción de núcleos cuando es necesaria una reparación de composites, de dientes vitales y no vitales y amalgamas.

Ha sido diseñado para eliminar las tensiones durante su inserción y proveer máxima retención en dentina y materiales restauradores.

#### INSTRUCCIONES DE USO

1. Determine el lugar de ubicación de los pines y marque suavemente el/los lugar/es de perforación con una fresa redonda de 1/4; a 1 mm del límite amelodentinario.
2. a) Labre en dentina el lecho para pin con la fresa *Unity* (750-1000 rpm). Perfore en dos etapas, primero a media profundidad. Limpie la fresa y lecho.  
b) Luego perfore en toda su profundidad y retire la fresa sin detenerla.
3. Limpie y seque el lecho para pin y, mediante un cono de papel, aplique barniz cavitario en éste.
4. Inserte el pin en el atomillador manual universal 6 en un contra-ángulo convencional con seguro. Ubíquelo sobre el conducto para pin, rosque con atomillador manual o active pieza de mano (200-500 rpm) y presione suavemente. El pin *Unity* se alineará y roscará en el conducto preparado y apenas se asiente el hombro autobloqueante, se producirá el cizalle del pin automáticamente.
5. Para que el pin *Unity* siga el contorno de la restauración final, puede acortarse o doblarse mediante el instrumento B61-R.

Ahora puede llevarse a cabo la restitución, ya sea un muñón o una restauración

#### ADVETENCIAS Y PRECAUCIONES

- El torno debe rotar en sentido horario en todo momento, durante la perforación y roscado del pin.
- Las fresas romas y/o deformadas provocan perforaciones sobredimensionadas.
- No doblar los pines a más de 45 grados.
- Al acortar un pin, sujételo firmemente con una pinza hemostática.
- Producto de un solo uso.

#### ALMACENAMIENTO

Mantener los envases bien cerrados a temperatura ambiente.

#### PRESENTACIONES

TI20L: kit completo: 20 pines de titanio + 1 fresa (taladro) + 1 llave de inserción)

TI3: 3 taladros de acero / titanio, 0.525mm (amarillo)

ST3: 3 taladros, 0.525mm (verde)

ST-20: Color verde. Kit completo: 20 pines de acero inoxidable (0.525 mm) + 1 taladro + 1 llave de inserción.

ST-50: Color verde. Kit bulk: 50 pines de acero inoxidable (0.525 mm) + 1 taladro.

S-3: Color verde. 3 taladros para pines de acero inoxidable (0.525 mm)

TI-20: Color amarillo. Kit completo de 20 pines de aleación de Titanio (0.525 mm) + 1 taladro + 1 llave de inserción.

TI-50 Color amarillo. Kit bulk: 50 pines de aleación de Titanio (0.525 mm) + 1 Taladro.

T-3: color amarillo. 3 taladros para pines de aleación de titanio (0.525 mm)

TI-20 M: Color rojo. Kit completo: 20 pines de aleación de titanio (0.425 mm)

TI-3 M: Color rojo. 3 taladros para pines de aleación de titanio (0.425 mm)

P/DENTAL MEDRANO S.A.  
  
MARTA D. de ETCHECCHIN  
APCIBERADA  
D.N.I. 4.099.497

Dr. ARMANDO BABAHIKIAN  
BIOQUÍMICO - FARMACÉUTICO  
DIRECTOR TÉCNICO  
DENTAL MEDRANO S.A.

6311



**Dental Medrano S.A.**

Paraguay 3026 (C1425BRL) Ciudad de Buenos Aires  
Tel: (011) 4962-9000 / Fax: (011) 4962-1212  
e-mail: [lab@dental-medrano.com.ar](mailto:lab@dental-medrano.com.ar)



**OTRAS PRESENTACIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA:**

- Marca PARAPOST ( Postes de aleación de: Acero Inoxidable, de Titanio, de Oro, o de plástico calcinable; Taladros de Acero Inoxidable o de Titanio; Kits)
- Marca TENAX (Postes de aleación Titanio, Plastic Burnout, Impression – Temporary, Fiber White, Fiber Trans; Taladros Tenax; Kits)

**USO PROFESIONAL EXCLUSIVO**

**VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**

Elaborado por Coltène/Whaledent Inc. – Cuyahoga Falls – OH – USA.

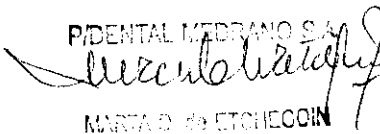
Importado y Comercializado por **Dental Medrano S.A.**

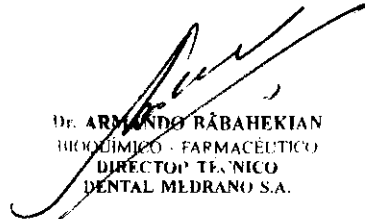
Paraguay 3026 – Buenos Aires (1425) – Argentina


Tel.: 4962-9000 / e-mail: [info@dental-medrano.com.ar](mailto:info@dental-medrano.com.ar)

Director Técnico: Armando Babahekian – Farmacéutico-Bioquímico - Mat. N°: 4317

Producto autorizado por la ANMAT: PM 235-105

DENTAL MEDRANO S.A.  
  
MARTA DE ETCHECCIN  
AFILIADA  
D.N.I. 4.095.407

  
Dr. ARMANDO BABAHEKIAN  
BIOQUÍMICO - FARMACÉUTICO  
DIRECTOR TÉCNICO  
DENTAL MEDRANO S.A.



**Dental Medrano S.A.**

Paraguay 3026 (C1425BRL) Ciudad de Buenos Aires  
Tel: (011) 4962-9000 / Fax: (011) 4962-1212  
www.dental-medrano.com.ar

**ANEXO III.B****PROYECTO DE RÓTULOS****PROYECTO DE RÓTULO DE ESTUCHE PARA LOS KITS****ParaPost**

Kit introductorio, técnica de una sola visita



XP Stainless Steel



XH Titanium Alloy

XP Titanium Alloy

XT Titanium Alloy

CONTIENE: 25 Postes de tamaños xxxx  
7 Taladros (uno de cada tamaño)  
1 llave manual universal

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente

Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.

Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina

Director Técnico Dr. Armando Babahekian.

Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

**ParaPost XP Casting****Technique Introductory**

Kit introductorio, técnica de colado

CONTIENE: 75 Postes de tamaños xxxx  
7 Taladros (uno de cada tamaño)

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente

Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.

Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina

Director Técnico Dr. Armando Babahekian.

Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

**ParaPost Fiber White**

Kit introductorio, técnica de una sola visita

CONTIENE: 10 Postes de tamaños xxxx  
3 Taladros (uno de cada tamaño)  
1 llave manual universal

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente

Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.

Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina

Director Técnico Dr. Armando Babahekian.

Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

DENTAL MEDRANO S.A.

MARTA D. de ETCHENEGUI

APODERADA  
D.N.I. 4.035.487

1 de 11

Dr. ARMANDO BABAHEKIAN  
BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO  
DIRECTOR TÉCNICO  
DENTAL MEDRANO S.A.



### ParaPost Taper Lux

Kit introductorio, técnica de una sola visita



**ParaPost Taper Lux**

CONTIENE: 15 Postes Tamaño xxxxx  
4 Taladros  
1 Llave de Mano Universal

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente

Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

### ParaPost FiberLux

Kit introductorio, técnica de una sola visita



**ParaPost Fiber Lux**

CONTIENE: 15 Postes Tamaño xxxxx  
6 Taladros  
1 Llave de Mano Universal

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente

Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

### ParaPost Adhesive Conditioner



**Adhesive Conditioner A**

3 ml



**Adhesive Conditioner B**

3 ml

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente

Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

DENTAL MEDRANO S.A.  
*Marta D. de Etcheberry*  
MARTA D. de ETCHEBERRY  
APOYADA  
D.N.I. 4.656.497

*Armando Babahekian*  
Dr. ARMANDO BABAHEKIAN  
BIOQUÍMICO - FARMACÉUTICO  
DIRECTOR TÉCNICO  
DENTAL MEDRANO S.A.



**ParaPost**

POSTES DE TITANIO - Refill

|                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>ParaPost Titanium Posts</b>    | <input type="checkbox"/> | <b>ParaPost XH Titanium Posts</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ParaPost XT Titanium Posts</b> |
| CONTIENE:                | 10 Postes de Titanio Tamaño xxxxx |                          | 10 Postes de Titanio Tamaño xxxxx |                          | 10 Postes de Titanio Tamaño xxxxx |
| <input type="checkbox"/> | <b>ParaPost Titanium Posts</b>    | <input type="checkbox"/> | <b>ParaPost XH Titanium Posts</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ParaPost XT Titanium Posts</b> |
| CONTIENE:                | 12 Postes de Titanio Tamaño xxxxx |                          | 25 Postes de Titanio Tamaño xxxxx |                          | 30 Postes de Titanio Tamaño xxxxx |

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
 VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
 Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
 Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
 Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
 Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

**ParaPost XP**

POSTES DE TITANIO - Refill

|                          |                                         |                                             |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>ParaPost XP Titanium Alloy Posts</b> | <input type="checkbox"/>                    | <b>ParaPost XP Titanium Alloy Posts</b> |
| CONTIENE:                | 10 Postes de Titanio Tamaño xxxxx       |                                             | 25 Postes de Titanio Tamaño xxxxx       |
|                          | <input type="checkbox"/>                | <b>ParaPost XP Titanium Temporary Posts</b> |                                         |
|                          | CONTIENE:                               | 20 Postes de Titanio temporarios            | Tamaño xxxxx                            |

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
 VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
 Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
 Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
 Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
 Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

**ParaPost CEMENT**

Introkit

|                          |                                                           |                                                             |                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>ParaPost Cement introkit - Estuche de introducción</b> | <input type="checkbox"/>                                    | <b>ParaPost Cement Refili - Estuche de recambio cemento</b> |
| CONTIENE:                | 2 jeringas pasta base de 2.5 g c/u                        |                                                             | 2 jeringas cemento base de 2.5 g c/u                        |
|                          | 2 jeringas pasta catalizador de 2.5 g c/u                 |                                                             | 2 jeringas cemento catalizador de 2.5 g c/u                 |
|                          | 1 frasco acondicionador A 3 ml                            | ó                                                           | 1 jeringa cemento base x 2.5 g c/u                          |
|                          | 1 frasco acondicionador B 3 ml                            |                                                             | 1 jeringa cemento catalizador x 2.5 g c/u                   |
|                          | <input type="checkbox"/>                                  | <b>ParaPost Cement - Estuche de recambio Acondicionador</b> |                                                             |
|                          | CONTIENE:                                                 | 1 frasco acondicionador A 3 ml                              |                                                             |
|                          |                                                           | 1 frasco acondicionador B 3 ml                              |                                                             |

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
 VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
 Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
 Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
 Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
 Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

DENTAL MEDRANO S.A.  
  
 MARTA D. de ETCHICONI  
 APODERADA  
 D.N.I. 4.095.497

Dr. ARMANDO BABAHEKIAN  
 BIQUÍMICO - FARMACÉUTICO  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 DENTAL MEDRANO S.A.



**ParaPost XT Llaves de Metal**

**Metal Wrenches**

CONTIENE: 1 pieza

**Universal Hand Driver**

1 pieza A / 1 pieza B / 2 piezas (A+B)

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente

Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
 VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
 Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
 Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
 Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
 Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

**ParaPost**

TALADROS

Refill

**ParaPost Drills**

**ParaPost XT Drills**

CONTIENE:  3 Taladros tamaño xxxx / Φ xxxxx mm     3 Taladros tamaño xxxx / Φ xxxxx mm  
 6 Taladros tamaño xxxx / Φ xxxxx mm     6 Taladros tamaño xxxx / Φ xxxxx mm

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente

Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
 VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
 Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
 Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
 Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
 Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

**ParaPost**

POSTES DE ACERO INOXIDABLE

**ParaPost Stainless Steel Posts**

**ParaPost XP Stainless Steel Posts**

CONTIENE: 10 Postes de Acero Inoxidable Tamaño xxxxx

10 Postes de Acero Inoxidable Tamaño xxxxx

**ParaPost Stainless Steel Posts**

**ParaPost XP Stainless Steel Posts**

CONTIENE: 25 Postes de Acero Inoxidable Tamaño xxxxx

25 Postes de Acero Inoxidable Tamaño xxxxx

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente

Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
 VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
 Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
 Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
 Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
 Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

DENTAL MEDRANO S.A.  
  
 MARTA D. de ETCHEOCOIN  
 APODERADA  
 C.N.I. 4.055.457

Dr. ARMANDO BABAEKIAN  
 BIQUÍMICO FARMACÉUTICO  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 DENTAL MEDRANO S.A.



6311



### ParaPost XP Plastic

POSTES DE PLÁSTICO

Refill



#### ParaPost XP Plastic Impression Posts

CONTIENE:  20 Postes Plásticos de Impresión Tamaño xxxxx  
 50 Postes Plásticos de Impresión Tamaño xxxxx



#### ParaPost XP Plastic Burnout Posts

10 Postes Plásticos Incinerables Tamaño xxxxx  
 25 Postes Plásticos Incinerables Tamaño xxxxx  
 100 Postes Plásticos Incinerables Tamaño xxxxx

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente

Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

### ParaPost Fiber Lux

Refill



#### ParaPost Fiber Lux

CONTIENE: 5 Postes / Respuesto Tamaño xxxxx

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente

Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

### ParaPost Taper Lux

Refill



#### ParaPost Taper Lux

CONTIENE: 5 Postes / Respuesto Tamaño xxxxx

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente

Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

DENTAL MEDRANO S.A.  
*Armando Babahekian*  
MARCA D. de ETCHEGOIN  
APOYADA  
D.N.I. 4.095.497

Dr. ARMANDO BABAHKIAN  
BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO  
DIRECTOR TÉCNICO  
DENTAL MEDRANO S.A.



**ParaPost Fiber White Posts**

POSTES DE FIBRA Refill

CONTIENE: 5 Postes Fiber White Tamaño xxxxx

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente Lote

---

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
 VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
 Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
 Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
 Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
 Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

**ParaPost XP No-Ox-Alloy Gold Post**

CASTING TECHNIQUE Refill

CONTIENE:  1 Pieza Tamaño xxxxx  5 Piezas Tamaño xxxxx

Almacenar en lugar seco a temperature ambiente

---

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
 VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
 Elaborado por Coltène/Whaledent Inc 235 Ascot Parkway- Cuyahoga Falls, OH 44223- USA.  
 Importado por DENTAL MEDRANO S.A. Paraguay 3026 (C1425BRL) Buenos Aires- Argentina  
 Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
 Autorizado por la ANMAT . PM 23505

**KODEX Drills**

CONTIENE: 24 piezas / 60 piezas  
 tamaño xxxx / Φ xxxxx mm

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente Lote

---

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....  
 VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
 Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
 Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
 Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
 Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

DENTAL MEDRANO S.A.  
  
 MARTA D. de ETHEQUIN  
 ANMAT S.A.  
 D.N.I. 4.095.492

Dr. ARMANDO BABAHEKIAN  
 BIOMINICO FARMACEUTICO  
 DIRECTOR TECNICO  
 DENTAL MEDRANO S.A.



**TENAX**

Kit completo, técnica de una sola visita

CONTIENE:  **Tenax Complete**  **Tenax Introductory**

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 Postes de Titanio + 50 Postes de impresión / temporarios + 50 Postes de plástico incinerables<br>7 Taladros (uno de cada tamaño)<br>1 llave manual universal | 20 Postes de Titanio + 20 Postes de impresión / temporarios + 20 Postes de plástico incinerables<br>3 Taladros (uno de cada tamaño)<br>1 llave manual universal |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente Lote

---

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....

**VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**  
 Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
 Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
 Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
 Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

**TENAX CASTING TECHNIQUE**

Kit completo, de una sola visita

CONTIENE:

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 Postes de Impresión / Temporarios<br>100 Postes de Plástico Incinerable Tamaño xxxxx<br>7 Taladros (uno de cada tamaño)<br>1 llave manual universal | 40 Postes de Impresión / Temporarios<br>40 Postes de Plástico Incinerable Tamaño xxxx<br>3 Taladros (uno de cada tamaño)<br>1 llave manual universal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente Lote

---

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....

**VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**  
 Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
 Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
 Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
 Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

**TENAX**

**One Office - Visit**

Kit completo, técnica de una sola visita

CONTIENE:

|                                                                                                  |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 Postes de Titanio Tamaño xxxxx<br>7 Taladros (uno de cada tamaño)<br>1 llave manual universal | 20 Postes de Titanio Tamaño xxxxx<br>3 Taladros (uno de cada tamaño)<br>1 llave manual universal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente Lote

---

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....

**VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**  
 Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.  
 Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina  
 Director Técnico Dr. Armando Babahekian.  
 Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

DENTAL MEDRANO S.A.  
*Armando Babahekian*  
 MARIA D. de ETCHEREGGIN  
 APODERADA  
 C.N.I. 4.095.487

*Armando Babahekian*  
 DR. ARMANDO BABAHÉKIAN  
 BIQUÍMICO - FARMACÉUTICO  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 DENTAL MEDRANO S.A.



**TENAX**

Kit de una sola visita + Casting

|                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Tenax Fiber White</b><br>CONTIENE: 15 Postes Fiber White<br>3 Taladros (uno de cada tamaño) | <input type="checkbox"/> <b>Tenax Fiber Trans</b><br>15 Postes Fiber Trans<br>3 Taladros (uno de cada tamaño) | <input type="checkbox"/> <b>Tenax Introductorio Fiber White / Titanio</b><br>10 Postes Fiber White + 10 Postes de Titanio<br>2 Taladros (uno de cada tamaño) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente Lote

---

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.

Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina

Director Técnico Dr. Armando Babahekian.

Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

**TENAX**

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">POSTES DE TITANIO /</p> <input type="checkbox"/> <b>Tenax Titanium Alloy Posts</b><br>CONTIENE: 15 Postes de Titanio tamaño xxxx | <p style="text-align: center;">POSTES de PLÁSTICO</p> <input type="checkbox"/> <b>Tenax Plastic Burnout Posts</b><br>30 Postes de Plástico Incinerables tamaño xxxx<br><input type="checkbox"/> <b>Tenax Impression / Temporary Posts</b><br>CONTIENE: 15 Postes de plástico tamaño xxxx |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente Lote

---

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.

Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina

Director Técnico Dr. Armando Babahekian.

Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

**TENAX**

TALADROS Refill

|                                                                                                                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Tenax Drills</b><br>CONTIENE: 3 Taladros tamaño xxxx / Φ xxxxx mm<br>6 Taladros tamaño xxxx / Φ xxxxx mm | <input type="checkbox"/> <b>Tenax Fiber Trans Drills</b><br>3 Taladros tamaño xxxx / Φ xxxxx mm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente Lote

---

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.

Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina

Director Técnico Dr. Armando Babahekian.

Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

DENTAL MEDRANO S.A.  
  
 MARTA D. de ETCHECOIN  
 ABOGADA  
 D.N.L. 4000487

Dr. ARMANDO BARAHEKIAN  
 BIQUÍMICO FARMACÉUTICO  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 DENTAL MEDRANO S.A.



# TENAX

## POSTES DE FIBRA

Refill

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTIENE:<br> <b>Tenax Fiber White Posts</b><br>5 Postes Fiber White<br>tamaño xxxx / Φ xxxxx mm |  <b>Tenax Fiber Trans Posts</b><br>5 Postes Fiber Trans<br>tamaño xxxx / Φ xxxxx mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente

Lote

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO - Condición de Venta .....

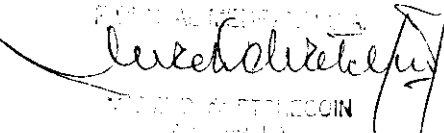
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

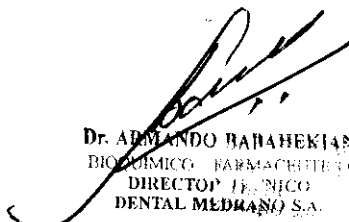
Elaborado por Coltène/Whaledent Inc - 235 Ascot Parkway - Cuyahoga Falls, OH 44223 - USA.

Importado por DENTAL MEDRANO S.A. - Paraguay 3026 (C1425BRL) - Buenos Aires - Argentina

Director Técnico Dr. Armando Babahekian.

Autorizado por la ANMAT . PM 235-105

  
 DENTEL MEDRANO S.A.  
 Director Técnico  
 Dr. Armando Babahekian  
 Tel: 4385.497

  
**Dr. ARMANDO BABAHEKIAN**  
 BIOLÓGICO FARMACÉUTICO  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 DENTAL MEDRANO S.A.



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

ANEXO III  
CERTIFICADO

Expediente N° 1-47-20925-10-2

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **6311**, y de acuerdo a lo solicitado por Dental Medrano S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: sistema de postes, taladros y pines endodónticos

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-202 postes para el canal de la raíz

Marca del producto médico: PARAPOST

Sistemas de taladros y postes endodónticos y sus accesorios

Sistemas de kits que incluyen postes y taladros en distintos calibres más sus accesorios.

Modelos:

XP System kit

-Casting Technique kit (técnica de colado). Incluye postes de impresión, temporarios y calcinables.

-One Office-Visit Technique: Incluye Postes de aleación de acero inoxidable.

XH System kit, XT System kit:

-Incluye Postes de aleación de Titanio.

FIBER LUX; FIBER WHITE Kits

-Incluye Postes de fibra (lisos)

TAPER LUX kit

-Incluye Postes de fibra (surcados)-Todos los postes, taladros y accesorios como repuestos (Refill) en unidades y/o múltiples

\* TENAX

Sistema completo (Complete kit) de taladros y postes endodónticos para todas las técnicas y sus accesorios.

Taladros (Drills) en unidades y/o múltiplos de diversas medidas.

-Tenax Drills; Fiber Trans Drills

Sistemas en kit que incluyen postes y taladros en distintos calibres más sus accesorios:

-Complete; Introductory; One Office-Visit Complete; One Office-Visit Introductory; Casting Technique; Casting Technique Introductory; Fiber White Titanio Introductory; Fiber Trans

\* UNITY

Sistema de Pines y Taladros en material de acero inoxidable y/o Titanio.

Sistemas en Kit completo y de repuesto, Mini Unity completo.

Clase de Riesgo: II

Indicación/es autorizada/s: sistema de anclaje intrarradicular para sostener la restauración dental

Período de vida útil: 5 años

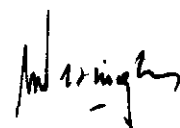
Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Coltene/ Whaledent Inc.

Lugar/es de elaboración: 235 Ascot Parkway, Cuyahoga Falls, OH 44223,USA

Se extiende a Dental Medrano S.A. el Certificado PM-235-105 en la Ciudad de Buenos Aires, a .....<sup>16 SEP 2011</sup>....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N° 6311



Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.