



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

"2011: Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

DISPOSICIÓN N° 6662

BUENOS AIRES, 29 SEP 2011

VISTO el Expediente N° 1-47-5793/11-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Biogamma SRL solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Inspección
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N° 6662

"2011: Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Ackermann, nombre descriptivo clips hemostáticos y nombre técnico clips hemostáticos, de acuerdo a lo solicitado, por Biogamma SRL, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 85-88, 94 y 89-92, 17-19 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N° 6662

"2011: Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1972-5, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscribáse en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-5793/11-6

DISPOSICIÓN N° **6662**

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° **6662**

Nombre descriptivo: clips hemostáticos.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 10-898 clips hemostáticos.

Marca de (los) producto(s) médico(s): Ackermann

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: oclusión de vasos.

Modelo/s:

- AI74CL6 Clips grandes 6 unidades por cartucho, 20 cartuchos por caja (120 unidades)
- AI74CM6 Clips medianos 6 unidades por cartucho, 20 cartuchos por caja (120 unidades)
- AI74CML6 Clips medianos/grandes 6 unidades por cartucho, 20 cartuchos por caja (120 unidades)
- AI74CS6 Clips pequeños 6 unidades por cartucho, 20 cartuchos por caja (120 unidades)

Período de vida útil: 5 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.


Nombre del fabricante: Ackermann Instrumente GmbH

Lugar/es de elaboración: Eisenbahnstrabe 65-67 D-78604 Rietheim-Weilheim-Alemania.

Expediente N° 1-47-5793/11-6

DISPOSICIÓN N°

6662

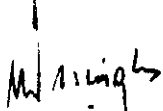
Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

"2011: Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

6662
.....

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

"2011: Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-5793/11-6

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **6662**, y de acuerdo a lo solicitado por Biogamma SRL, se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: clips hemostáticos.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 10-898 clips hemostáticos.

Marca de (los) producto(s) médico(s): Ackermann

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: oclusión de vasos.

Modelo/s:

- AI74CL6 Clips grandes 6 unidades por cartucho, 20 cartuchos por caja (120 unidades)
- AI74CM6 Clips medianos 6 unidades por cartucho, 20 cartuchos por caja (120 unidades)
- AI74CML6 Clips medianos/grandes 6 unidades por cartucho, 20 cartuchos por caja (120 unidades)
- AI74CS6 Clips pequeños 6 unidades por cartucho, 20 cartuchos por caja (120 unidades)

//..

Período de vida útil: 5 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.


Nombre del fabricante: Ackermann Instrumente GmbH

Lugar/es de elaboración: Eisenbahnstrabe 65-67 D-78604 Rietheim-Weilheim-
Alemania.

Se extiende a Biogamma SRL el Certificado PM-1972-5, en la Ciudad de Buenos Aires, a29.SEP.2011....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N°

6662

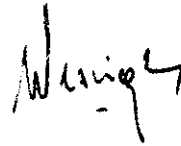

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS

ANEXO III B (parte 3)

PRODUCTO:

CLIPS HEMOSTÁTICOS DE TITANIO

3) INSTRUCCIONES DE USO

3.1) Leer detalladamente las especificaciones comprendidas en los rótulos

3.2 hasta 3.14 se detallan a continuación.

Descripción del dispositivo:

Clip hemostáticos de titanio.

Indicaciones:



El clip hemostático EUROCLIP permite realizar oclusión de vasos. Su forma de espiga abarca todo el vaso que se quiera ligar.

La micro geometría de la superficie interna del clip garantiza una excelente posición del clip en el vaso.

Este clip se utiliza en todas las técnicas quirúrgicas que requieren hemostásis o un marcador radiográfico.

El operador elige la dimensión del clip según la intervención de modo que se garantice que el clip rodee todo el tejido a ligar.

El clip es de titanio puro, insensible a las radiaciones magnéticas procedentes del tomógrafo o el escaner.

El titanio es un material biológicamente inerte, el clip de titanio puede utilizarse in vivo a largo plazo con plena seguridad.

BIOGAMMA S.R.L.
JOSE R. CODES
SOCIO GERENTE

BIOGAMMA S.R.L.
CERVANTES 1860 - Godoy Cruz
(5500) MENDOZA
ANA SILVINA B.M.
DIRECTORA TÉCNICA
Mar. 13

Instrucciones:

Elegir el aplicador de clips por el eje de unión de las patillas.
Sujetar bien el cartucho que contiene los clips e introducir verticalmente las mordazas de la pinza en el cartucho de clips.
Apoyar hasta que el clip esté totalmente enganchado en las mordazas del aplicador. Rodear la parte que se vaya a ligar con las mordazas del instrumento. Apretar las patillas del aplicador hasta que llegue a su posición final.

Primero se produce el cierre de la parte distal del clip rodeando el tejido que vaya a ligarse, después el clip se va cerrando hasta el vértice de la espiga hasta que se cierre completamente.
Soltar las patillas y retirar el aplicador.

Precauciones de uso:**Cómo aplicar el clip en el aplicador:**

Utilizar las pinzas recomendadas.

Comprobar las pinzas y las mordazas antes de usarlas.

No sujetar nunca el aplicador por los anillos o por las patillas mientras se carga el clip en las mordazas del aplicador por que podría cerrarse el clip por descuido o colocarse mal en el aplicador.

Para evitar que se estropeen las mordazas de la pinza:

No introducir nunca las mordazas de la pinza en posición oblicua en el catucho de clips

Ligadura:

No apretar las patillas antes de que las mordazas rodeen completamente el tejido que se vaya a ligar.


Aprestar las patillas hasta que lleguen a su posición final para cerrar el clip completamente. Comprobar la ligadura para cerciorarse de la calidad de la aplicación y de la hemostásis.

Advertencia:

No volver a esterilizar el material. No utilizar el material si el embalaje está abierto o dañado. Destruir después de uso.



BIOGAMMA S.R.L.
JOSE R. CODES
SOCIO GERENTE

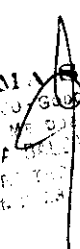


BIOGAMMA S.R.L.
CERVANTES 1800 GODOY CRUZ
(5501) 46 50 11
ANA SILVANA
DIRECTORA
Mat. 11 11 11

6662 / 19

Atención:

Reservado para uso exclusivo de un médico o bajo sus órdenes.

**MATERIAL DE UN SOLO USO
TIENE FECHA DE VENCIMIENTO
PRODUCTO ESTÉRIL SI EL EMBALAJE ESTÁ ABIERTO
O DAÑADO
ESTERILIZADO POR RAYOS GAMMA
LEER DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
PROTEGER CONTRA LA HUMEDAD**


BIOGAMMA S.R.L.
JOSE R. ODES
SOCIO GERENTE

BIOGAMMA S.R.L.
CERVANTES 1860 - GOBOY CRUZ
(5501) MENDOZA
ANA SILVINA BALZARELLI
DIRECTORA GENERAL
Mar. 1. 13

REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS

ANEXO III B (parte 2)

PRODUCTO:

CLIPS HEMOSTÁTICOS DE TITANIO

2)RÓTULOS

Están contemplados los punto 2.1 hasta 2.10

Rótulo para : Clips Hemostáticos de titanio tamaño: **Small**

Clips hemostáticos. Uso quirúrgico. Autorizado por ANMAT
Lot(el que corresponda).Vto.(el que corresponda).Ref.AI74CS6
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
No utilizar si el embalaje está abierto o dañado
Conservar en lugar seco
Fabricado por: Ackermann Instrumente GMBH
Eisenbahnstrasse 65-67.78604 Rietheim-Weilheim.Germany
Importado por:BIOGAMMA SRL. Cervantes 1860. Godoy Cruz . Mendoza
N° de registro: 1972-5
D.T. Farm Ana Silvina Balzarelli Mat: 2323
Átoxico,esteril, libre de pirógenos .Uso único

BIOGAMMA S.R.L.
JOSE R. CODES
BUENAFERENTE

BIOGAMMA S.R.L.
CERVANTES 1860 - GODOY CRUZ
(3500) MENDOZA
ANA SILVINA BALZARELLI
DIRECTORA TÉCNICA
Mat. 2323

REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS

ANEXO III B (parte 2)

PRODUCTO:

CLIPS HEMOSTÁTICOS DE TITANIO

2)RÓTULOS

Están contemplados los punto 2.1 hasta 2.10

Rótulo para : Clips Hemostáticos de titanio tamaño: **Medio**

Clips hemostáticos. Uso quirúrgico. Autorizado por ANMAT
Lot(el que corresponda).Vto.(el que corresponda).Ref.AI74CM6
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
No utilizar si el embalaje está abierto o dañado
Conservar en lugar seco
Fabricado por: Ackermann Instrumente GMBH
Eisenbahnstrasse 65-67.78604 Rietheim-Weilheim.Germany
Importado por:BIOGAMMA SRL. Cervantes 1860. Godoy Cruz . Mendoza
N° de registro: 1972-5
D.T. Farm Ana Silvana Balzarelli Mat: 2323
Átoxico,esteril, libre de pirógenos .Uso único

BIOGAMMA S.R.L.
JOSE P. GODES
Mendoza

BIOGAMMA S.R.L.
CERVANTES 1860 GODOY CRUZ
(5501) MENDOZA
ANA SILVINA BALZARELLI
DIRECTORA TECNICA
Mat 2323

REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS

ANEXO III B (parte 2)

PRODUCTO:

CLIPS HEMOSTÁTICOS DE TITANIO

2)RÓTULOS

Están contemplados los punto 2.1 hasta 2.10

Rótulo para : Clips Hemostáticos de titanio tamaño: **Medio/Largo**

Clips hemostáticos. Uso quirúrgico. Autorizado por ANMAT
Lot(el que corresponda).Vto.04/2010.Ref.AI74CML6
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
No utilizar si el embalaje está abierto o dañado
Conservar en lugar seco
Fabricado por: Ackermann Instrumente GMBH
Eisenbahnstrasse 65-67.78604 Rietheim-Weilheim.Germany
Importado por: BIOGAMMA SRL. Cervantes 1860. Godoy Cruz . Mendoza
N° de registro: 1972-5
D.T. Farm Ana Silvina Balzarelli Mat: 2323
Átoxico,esteril, libre de pirógenos .Uso único

BIOGAMMA S.R.L.
JOSEPH CODES
DIRECTOR GENERAL

BIOGAMMA S.R.L.
CERVANTES 1860 - 30007 CRUZ
(5931) MENDOZA
ANA SILVINA BALZARELLI
DIRECTORA GENERAL
Mat. 2323

REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS

ANEXO III B (parte 2)

PRODUCTO:

CLIPS HEMOSTÁTICOS DE TITANIO

2)RÓTULOS

Están contemplados los punto 2.1 hasta 2.10

Rótulo para : Clips Hemostáticos de titanio tamaño: **Largo**

Clips hemostáticos. Uso quirúrgico. Autorizado por ANMAT
Lot(el que corresponda).Vto.(el que corresponda).Ref.AI74CL6
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
No utilizar si el embalaje está abierto o dañado
Conservar en lugar seco
Fabricado por: Ackermann Instrumente GMBH
Eisenbahnstrasse 65-67.78604 Rietheim-Weilheim.Germany
Importado por:BIOGAMMA SRL. Cervantes 1860. Godoy Cruz . Mendoza
N° de registro: 1972-5
D.T. Farm Ana Silvina Balzarelli Mat: 2323
Átoxico,esteril, libre de pirógenos .Uso único

BIOGAMMA S.R.L.
JOSÉ M. CODES
SOCIO GERENTE

BIOGAMMA S.R.L.
CERVANTES 1860-GODOY CRUZ
MENDOZA
ANA SILVINA BALZARELLI
DIRECTORA TÉCNICA
Mat. 2323

REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS**ANEXO III B (parte 3)****PRODUCTO:****CLIPS HEMOSTÁTICOS DE TITANIO****3) INSTRUCCIONES DE USO**

3.1) Leer detalladamente las especificaciones comprendidas en los rótulos de origen

3.2 hasta 3.14 se detallan a continuación.

REF: AI74CS6

NOMBRE DEL PRODUCTO : Clips hemostáticos
(Chico)

CONTENIDO: (120 Unidades)

LOTE: (el que corresponda)

FECHA DE FABRICACIÓN: (la que corresponda)

FECHA DE VENCIMIENTO: (cinco años posterior a la fecha de elaboración)

ADVERTENCIAS:- Solo debe utilizarse por profesionales e instituciones sanitarias.

-No utilizar si el embalaje está roto

PRODUCTO DE ÚNICO USO

PRODUCTO ESTÉRIL R

FABRICANTE: Ackermann Instrumente GMBH

Eisenbahnstrasse 65-67.78604 Rietheim-Weilheim.Germany

IMPORTADOR: Biogamma srl. Cervantes 1860 . Godoy Cruz
Mendoza, Argentina

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar en lugar fresco, seco ,sin congelar, al abrigo de la luz. No utilizar si se detectan abolladuras en los envases.

N° de registro: 1972-5

D.T. Farm Ana Silvina Balzarelli Mat: 2323

Garantía: Fabricado y envasado acorde a 93/42/EWG. Cada lote es revisado antes de ser envasado **CE 0535**

BIOGAMMA (S.R.L.)
JOSE R. CODES
CERVANTES 1860 - GODOY CRUZ

BIOGAMMA S.R.L.
CERVANTES 1860 - GODOY CRUZ
MENDOZA - ARGENTINA

REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS**ANEXO III B (parte 3)****PRODUCTO:****CLIPS HEMOSTÁTICOS DE TITANIO****3) INSTRUCCIONES DE USO**

3.1) Leer detalladamente las especificaciones comprendidas en los rótulos de origen

3.2 hasta 3.14 se detallan a continuación.

REF: AI74CM6

NOMBRE DEL PRODUCTO : Clips hemostáticos
(Medio)

CONTENIDO: (120 Unidades)

LOTE: (el que corresponda)

FECHA DE FABRICACIÓN: (la que corresponda)

FECHA DE VENCIMIENTO: (cinco años posterior a la fecha de elaboración)

ADVERTENCIAS:- Solo debe utilizarse por profesionales e instituciones sanitarias.

-No utilizar si el embalaje está roto

PRODUCTO DE ÚNICO USO

PRODUCTO ESTÉRIL R

FABRICANTE: Ackermann Instrumente GMBH

Eisenbahnstrasse 65-67.78604 Rietheim-Weilheim.Germany

IMPORTADOR: Biogamma srl. Cervantes 1860 . Godoy Cruz

Mendoza, Argentina

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar en lugar fresco, seco ,sin congelar, al abrigo de la luz. No utilizar si se detectan abolladuras en los envases.

N° de registro: 1972-5

D.T. Farm Ana Silvina Balzarelli Mat: 2323

Garantía: Fabricado y envasado acorde a 93/42/EWG. Cada lote es revisado antes de ser envasado **CE 0535**

BIOGAMMA S.R.L.
JOSE R. CODES
CERVANTES 1860

BIOGAMMA S.R.L.
CERVANTES 1860 - GODOY CRUZ
(RUC) - MENDOZA
ANA SILVINA BALZARELLI

REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS**ANEXO III B (parte 3)****PRODUCTO:****CLIPS HEMOSTÁTICOS DE TITANIO****3) INSTRUCCIONES DE USO**

3.1) Leer detalladamente las especificaciones comprendidas en los rótulos de origen

3.2 hasta 3.14 se detallan a continuación.

REF: AI74CML6

NOMBRE DEL PRODUCTO : Clips hemostáticos
(Medio/Largo)

CONTENIDO: (120 Unidades)

LOTE: (el que corresponda)

FECHA DE FABRICACIÓN: (la que corresponda)

FECHA DE VENCIMIENTO: (cinco años posterior a la fecha de elaboración)

ADVERTENCIAS:- Solo debe utilizarse por profesionales e instituciones sanitarias.

-No utilizar si el embalaje está roto

PRODUCTO DE ÚNICO USO

PRODUCTO ESTÉRIL R

FABRICANTE: Ackermann Instrumente GMBH

Eisenbahnstrasse 65-67.78604 Rietheim-Weilheim.Germany

IMPORTADOR: Biogamma srl. Cervantes 1860 . Godoy Cruz

Mendoza, Argentina

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar en lugar fresco, seco ,sin congelar, al abrigo de la luz. No utilizar si se detectan abolladuras en los envases.

Nº de registro: 1972-5

D.T. Farm Ana Silvana Balzarelli Mat: 2323

Garantía: Fabricado y envasado acorde a 93/42/EWG. Cada lote es revisado antes de ser envasado **CE 0535**

BIOGAMMA S.R.L.
JOSE R. BODES
DIRECTOR GENERAL

BIOGAMMA S.R.L.
CERVANTES 1860 - GODOY CRUZ
3500 MENDOZA
ANA SILVINA BALZARELLI
DIRECTORA TÉCNICA
Mat. 8323

REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS**ANEXO III B (parte 3)****PRODUCTO:****CLIPS HEMOSTÁTICOS DE TITANIO****3) INSTRUCCIONES DE USO**

3.1) Leer detalladamente las especificaciones comprendidas en los rótulos de origen

3.2 hasta 3.14 se detallan a continuación.

REF: AI74CL6

NOMBRE DEL PRODUCTO : Clips hemostáticos
(Largo)

CONTENIDO: (120 Unidades)

LOTE: (el que corresponda)

FECHA DE FABRICACIÓN: (la que corresponda)

FECHA DE VENCIMIENTO: (cinco años posterior a la fecha de elaboración)

ADVERTENCIAS:- Solo debe utilizarse por profesionales e instituciones sanitarias.

-No utilizar si el embalaje está roto

PRODUCTO DE ÚNICO USO

PRODUCTO ESTÉRIL R

FABRICANTE: Ackermann Instrumente GMBH

Eisenbahnstrasse 65-67.78604 Rietheim-Weilheim.Germany

IMPORTADOR: Biogamma srl. Cervantes 1860 . Godoy Cruz
Mendoza, Argentina

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar en lugar fresco, seco ,sin congelar, al abrigo de la luz. No utilizar si se detectan abolladuras en los envases.

Nº de registro: 1972-5

D.T. Farm Ana Silvina Balzarelli Mat: 2323

Garantía: Fabricado y envasado acorde a 93/42/EWG. Cada lote es revisado ántes de ser envasado **CE 0535**

BIOGAMMA S.R.L.
JOSE R. CODES
CERVANTES 1860

BIOGAMMA S.R.L.
CERVANTES 1860 - GODOY CRUZ
MENDOZA
ANA SILVINA BALZARELLI
DIRECTORA TÉCNICA
Mat. 2323

Rev. 02
CE 0595

20 pcs.

Ackermann

A174CML6

Medium/Large clips 6 per cartridge
20 Cartridges per box
50220 Prod. 10263-19330-



STERILE R



LOT 49336



WW 14/10/2008



30/09/2013

Ackermann Instr.
Eisenbahnstr. 65-67
D-78604 Weilheim
Made in Germany
ILN 42 503022 00004



4 250302 234153

BIGGALMA S.R.L.
MOSBY

BIGGALMA S.R.L.
CERVANTES 1060 - BODOY CAJAL
(501) MENDOZA
ANA SILVINA BALZARELLI
DIRECTORA TECNICA
Mat. 2323