



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° **6711**

BUENOS AIRES, 30 SEP 2011

VISTO el Expediente N° 1-47-2110/10-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Esaote Latinoamérica S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, Incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, Inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto

425/10



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° **6711**

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Esaote, nombre descriptivo Ecógrafo Doppler y nombre técnico Sistemas de Exploración, por Ultrasonido, de acuerdo a lo solicitado por Esaote Latinoamérica S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 124 y 91 a 112 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1099-30, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° **6711**

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-2110/10-5

DISPOSICIÓN N° **6711**

ejb

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº**6711**.....

Nombre descriptivo: Ecógrafo Doppler

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 14-278 - Sistemas de
Exploración, por Ultrasonido

Marca de (los) producto(s) médico(s): ESAOTE

Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: aplicaciones: pediátricas y cefálicas neonatales,
músculoesqueléticas, abdominales, ginecológicas, obstétricas, órganos
pequeños y partes blandas.

Modelo/s: My LabOne

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones
sanitarias


Nombre del fabricante: ESAOTE EUROPE B.V.

Lugar/es de elaboración: Postbus 1132, 6201 BC Maastricht, Países Bajos.

Expediente Nº 1-47-2110/10-5

DISPOSICIÓN Nº **6711**

ejb

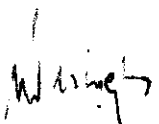

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.




Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

.....**6711**.....

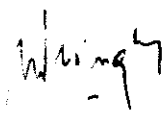
Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO III
CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-2110/10-5

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **6711**, y de acuerdo a lo solicitado por Esaote Latinoamérica S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Ecógrafo Doppler

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 14-278 - Sistemas de Exploración, por Ultrasonido

Marca de (los) producto(s) médico(s): ESAOTE

Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: aplicaciones: pediátricas y cefálicas neonatales, músculoesqueléticas, abdominales, ginecológicas, obstétricas, órganos pequeños y partes blandas.

Modelo/s: My LabOne

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: ESAOTE EUROPE B.V.

Lugar/es de elaboración: Postbus 1132, 6201 BC Maastricht, Países Bajos.

Se extiende a Esaote Latinoamérica S.A. el Certificado PM-1099-30, en la Ciudad de Buenos Aires, a..... **30 SEP 2011**, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N°

6711

ejb

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Instrucciones de uso

Importado por:

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.
SAN MARTIN 551, Cuerpo C, Piso 8, OF. 52
(C1004AAK) CABA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

MYLABONE

ID.N°

Fabricado :

ESAOTE EUROPE B.V.

Domicilio social: Philipsweg 1 , 6227 AJ Maastrich- Holanda

Para operar esta unidad deberá leerse las instrucciones de uso se detallan en el manual del uso.

Las condiciones de almacenamiento y conservación, incluyendo rangos de los parámetros de detallan en el manual de uso.

Director Técnico: Bioing. Luís Andrian

MAT. N° 5240

[Condición de venta]

Producto autorizado por ANMAT PM- 1099-30

Información adicional sobre seguridad

Este capítulo proporciona información adicional sobre seguridad para los productos **Mylabone**. Lea atentamente el manual "Seguridad y normas" para obtener una visión general exhaustiva de todos los aspectos relacionados con la seguridad de los productos **Mylabone**.

Seguridad medioambiental

Este sistema contiene una batería. La batería contiene pilas de ion-litio. El tubo fluorescente incluido con la pantalla LCD contiene mercurio. La batería y la pantalla LCD deben ser tratados como residuos especiales conforme a la normativa local aplicable. El equipo debe ser clasificado como residuo especial para su eliminación conforme a la normativa local aplicable. Consulte a las autoridades locales para obtener más información acerca de la normativa en materia de eliminación de

residuos
ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

BIOING LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TÉCNICO



Seguridad en el transporte

El sistema se puede guardar en el Mylabtwice o se puede conectar a un carrito de altura regulable (opcional). Las cuatro ruedas del carrito de altura regulable vienen equipadas con frenos que se pueden activar por separado.

- No coloque el sistema en superficies inclinadas.
- No utilice los frenos para colocar el sistema en una superficie inclinada.
- Si su sistema cuenta con periféricos, asegúrese de sujetarlos bien con cinta adhesiva de doble cara. Para transportar el sistema en un vehículo, se recomienda encarecidamente retirar los periféricos y seguir las instrucciones del fabricante del dispositivo.

Compatibilidad electromagnética

Este sistema está diseñado para su uso en entornos electromagnéticos según lo expuesto en los siguientes cuadros conforme a la norma IEC 60601-1-2:2001. El usuario debe asegurarse de utilizar el sistema conforme a esta norma.

Emisiones electromagnéticas

Prueba de emisión Conformidad Entorno electromagnético

Prueba de emisión	Conformidad	Entorno electromagnético
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Grupo 1	Mylabone emplea energía de radiofrecuencia únicamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, las emisiones de radiofrecuencia producidas son muy bajas y es improbable que interfieran con los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11		
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Clase B	Mylabone se puede utilizar en cualquier tipo de establecimiento, incluidas viviendas y otros locales conectados directamente a la red pública de suministro eléctrico de baja tensión que abastece edificios de viviendas.
Emisiones armónicas en la red de suministro eléctrico IEC 61 000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de tensión y parpadeos IEC 61000-3-3	Conforme	
Fluctuaciones de tensión y parpadeos IEC 61000-3-3		

Inmunidad electromagnética

Las pruebas electromagnéticas se realizan con el fin de reproducir los transitorios que se producen normalmente en un entorno electromagnético. Mylabone ha sido sometido a pruebas de inmunidad electromagnética para comprobar los transitorios y valores típicos en entornos domésticos, hospitalarios y comerciales.

Prueba de inmunidad	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético y medidas que deben tomarse
Despacho LATINOAMERICA S.A.		Los suelos deben ser de un material...
<p>ESAO TE LATINOAMERICA</p> <p><i>Maria Grazia Bella</i></p> <p>MARIAGRAZIA BELLA PRESIDENTE</p>	<p><i>Bioing Luis Andrian</i></p>	<p>ESAO TE LATINOAMERICA S.A.</p> <p>BIOING LUIS ANDRIAN - M.N. 5240 DIRECTOR TECNICO</p>



(ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV en contacto ±8 kV en aire	antiestático (madera, cemento o baldosa cerámica). Si están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser superior al 30%.
Ráfagas y transitorios eléctricos rápidos IEC 61000-4-4	±2 kV en la red de suministro eléctrico ±1 kV en las líneas de entrada/salida	La calidad de la red eléctrica y los campos magnéticos con frecuencia de red deberían ser los típicos de entornos comerciales u hospitalarios.
Pulso IEC 61000-4-5	±1 kV modo diferencial ±2 kV modo común	Si el usuario de Mylabone necesita utilizar el sistema de forma continua durante un corte del suministro eléctrico, se recomienda abastecer Mylabone con un sistema de alimentación ininterrumpida o una batería.
Caídas de tensión, breves interrupciones y variaciones de tensión en las líneas de entrada del suministro eléctrico IEC 61000-4-11	<5 % de la tensión nominal (UT)(hueco de tensión >95%)para 0,5 ciclos 40 % UT(caída de tensión del60%)para 5 ciclos 70% UT(caída de tensión de 30%)para 25 ciclos <5% UT(caída de tensión >95%)durante 5 s	
Campo magnético con frecuencia de red (50/60 Hz)IEC 61000-4-8	3 A/m	
RF conducida EC 61 000-4-6	3 Vrms De 150 kHz a80 MHz	Los equipos de comunicación por radiofrecuencia (RF) móviles o portátiles deberían utilizar a distancia mayores que las indicadas en el cuadro siguiente.
RF radiada EC 61000-4-3	3 V/m De 80 MHz aGHz	Se pueden producir interferencias electromagnéticas cerca de los aparatos.

Distancias recomendadas entre sistemas de comunicación por radiofrecuencia (RF) y Mylabone.

Como se indica en el manual "Seguridad y normas", se recomienda no utilizar sistemas de transmisión por radiofrecuencia (RF) cerca del sistema de ultrasonido. Los sistemas de RF pueden causar interferencias que afecten a la imagen de ultrasonido.

El usuario puede evitar las interferencias causadas por campos electromagnéticos manteniendo una distancia mínima entre el sistema de ultrasonido y el sistema de comunicación por RF (teléfonos móviles, etc.). El cuadro indica la distancia mínima en metros que se debe mantener con respecto a la potencia máxima de salida del sistema de RF.

Potencia máxima desalida del transmisor (W)	Distancia según la frecuencia de transmisión (m)		
	De 150 kHz a 80 MHz d = 1.2 (raiz cuadrada) de P	De 80 MHz a800 GHzd = (raiz cuadrada) de P	De 800 MHz a2,5 GHzd = 2.3 (raiz cuadrada) de P
0,01	0,12	0,12	0,23

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

BIOINGE LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TECNICO



Instrucciones de uso "Ecógrafo MylabOne"

0,10	0,38	0,38	0,73
1	1,20	1,20	2,30
10	3,80	3,80	7,30
100	12	12	23

Para transmisores cuya potencia máxima de salida no se indica en el cuadro, la distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede calcular utilizando la fórmula aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según las especificaciones del fabricante del mismo.

NOTA 1 Aplique siempre la mayor distancia indicada en el cuadro por precaución.

NOTA 2 La propagación electromagnética está sometida a los fenómenos de absorción y reflexión causados por la presencia de estructuras, objetos y personas. Los valores indicados en el cuadro son directrices de carácter general.

El usuario debe tener en cuenta que la intensidad de los campos electromagnéticos generados por transmisores fijos (estaciones base de radio para telefonía móvil o inalámbrica, transmisiones de TV y radio, transmisiones de radioaficionados, etc.) no se pueden calcular de forma teórica. Por lo tanto, puede ser necesario realizar una medición directa del entorno en el que se utiliza el sistema **Mylabone**. Si la intensidad de los campos electromagnéticos supera la especificada en los cuadros anteriores y el sistema de ultrasonido no funciona correctamente, puede ser necesario realizar mediciones adicionales, como, por ejemplo, la colocación del sistema en una ubicación distinta.

Temperatura superficial de las sondas

Mylabone ha sido diseñado para mantener la temperatura superficial de las sondas dentro de los límites indicados por la norma IEC 60601-2-37. Con el fin de evitar un sobrecalentamiento de las sondas, puede congelar el sistema al finalizar el examen pulsando el botón FREEZE.

2 - Aplicaciones clínicas

Mylabone está diseñado para ser utilizado por personas cualificadas para utilizar sistemas de ultrasonido.

Nota: El usuario debe ajustarse siempre al principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable, es decir, el mínimo razonablemente posible). Esto significa que debe utilizar la potencia acústica mínima durante el menor tiempo posible para obtener toda la información de diagnóstico necesaria.

Uso previsto

Mylabone se puede utilizar para las siguientes aplicaciones:

Advertencia: No utilizar Mylabone para aplicaciones oftálmicas ni transorbitales.

Aplicación	Notas
Vascular	Incluye la aplicación PERIFÉRICA VASCULAR (PV).

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

BIGING LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TÉCNICO



Obstétrica	Incluye las aplicaciones FETAL (OB) Y GINECOLÓGICA (GIN)
Formación general de imágenes	Incluye las aplicaciones ABDOMINAL (ABD), PEDIÁTRICA (PED), PECHO (PEC), TIROIDES (TIR), otras PARTES BLANDAS (PB)(testículos, etc.), MEDICINA DE URGENCIAS (MU) y MUSCULOESQUELETICA (ME).

Aplicaciones clínicas

En los siguientes cuadros se enumeran las sondas del sistema **Mylabone** y su uso Clínico previsto.

	PED	PV	OP	TIR	ME	PEC	CN	CA	ABD	OB-GIN
Sondas LA										
Sonda lineal SL3323 L40 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	
Sonda lineal SL3116 L20 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK				

	PED	PV	OP	TIR	ME	PEC	CN	CA	ABD	OB-GIN
Sondas CA										
Sonda convexa SC3421 7-3 radio 40 mm	OK	OK			OK	OK			OK	OK
Sonda convexa SC3123 10-6 radio 14	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	

	PED	PV	OP	TIR	ME	PEC	CN	CA	ABD	OB-GIN
Sondas Endocavitaria										
Sonda endocavitaria SE3123 radio 10 mm										OK

CAR: cardiaca (de adultos y pediátrica); PED: pediátrica; PV: periférico vascular (acceso vascular incluido); PB: partes blandas y órganos pequeños; TIR: tiroides; ME: músculo esquelético (aplicación para bloqueo nervioso periférico incluida); PEC: pecho; CN: cefálica neonatal; CA: cefálica adulta; ABD: abdominal;; OB-GIN: obstétrica y ginecológica; MU: medicina de urgencias.

Aplicaciones pediátricas y cefálicas neonatales

La sonda envía ondas de ultrasonido al organismo para obtener imágenes y evaluar los flujos en los exámenes pediátricos y neonatales. En el último caso, la sonda envía señales de ultrasonido a través de la fontanela para visualizar estructuras cerebrales (formación de imágenes) o flujos (Doppler) con objeto de detectar anomalías estructurales o funcionales.

Aplicaciones vasculares

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

Maria Grazia Bella
MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

Bioing Luis Andrian
ESAOTE LATINOAMERICA S.A.
BIOING LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TECNICO



La sonda aplica ondas de ultrasonidos sobre el cuello o extremidades del paciente con el fin de obtener una imagen de la arteria carótida o de otros vasos sanguíneos periféricos que sirvan para detectar anomalías u obstrucciones de los vasos. En los modos Doppler, la Sonda envía señales de ultrasonido al cuello o las manos/pies del paciente para determinar la velocidad de la sangre, el flujo o la falta del mismo y la permeabilidad de los vasos sanguíneos periféricos.

Aplicación de órganos pequeños y partes blandas

La sonda se coloca en la piel para obtener una imagen de órganos pequeños, como la glándula tiroides (cuello), los testículos (escroto) y el pecho con objeto de detectar anomalías.

Aplicaciones musculoesqueléticas

En la aplicación musculoesquelética las valoraciones clínicas se realizan a partir de tejido muscular, tendones y nervios.

Aplicaciones abdominales y otras asociadas

La sonda envía señales al abdomen del paciente para obtener una imagen de los órganos abdominales con el fin de detectar anomalías (formación de imágenes) y evaluar la velocidad de la sangre, el flujo y la permeabilidad de los vasos sanguíneos usando el Doppler.

Aplicación ginecológica

Las ondas de ultrasonido se envían por el interior del organismo para obtener una imagen de los órganos genitales y urinarios femeninos, y evaluar (Doppler) la velocidad de la sangre, el flujo y la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Para este tipo de exámenes endovaginales se emplea una sonda endocavitaria.

Aplicación obstétrica

La sonda envía ondas de ultrasonido al abdomen de una mujer embarazada para obtener una imagen del feto y detectar anomalías estructurales, o para visualizar y medir parámetros anatómicos y fisiológicos del feto con el fin de evaluar la edad fetal. En los modos Doppler, la sonda envía señales al abdomen de la paciente para detectar posibles anomalías en el flujo placentario y fetal. También puede usarse una sonda endocavitaria para tal fin (estudios **endovaginales**).

3 - Componentes del sistema e instalación

El sistema **Mylabone** será instalado por personal de ESAOTE. Estos son responsables de la apertura del paquete y de comprobar que el sistema se instala correctamente y que todo funciona. Este capítulo ofrece una visión general de los componentes del sistema y de las operaciones más importantes que pueden necesitarse.

Configuraciones

Mylabone se puede utilizar con carrito de altura regulable o sin él para complementar las configuraciones móvil o de sujeción con brazo.

ESAOTE LATINOAMERICA S.A


MARIAGRAZIA BELLA
COORDINANTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A

BISONG LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TECNICO



Configuración de sujeción con brazo.

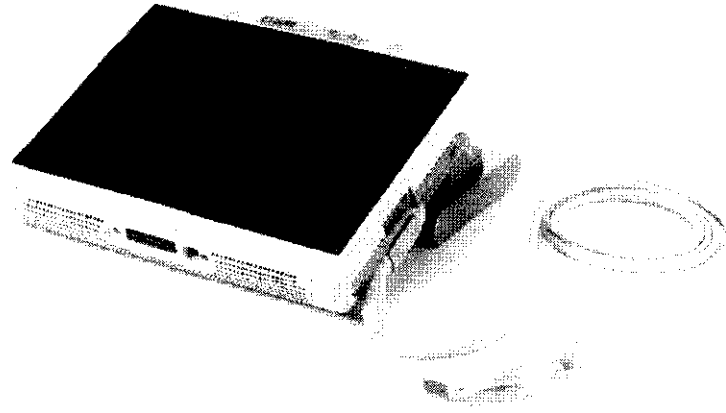

La unidad contiene el sistema electrónico del escáner, pantalla táctil integrada con LCD, un micrófono, altavoces, conector para sondas, conector de seguridad Kensington, conector para el soporte de escritorio, dos conectores USB, botón ON/OFF y un lápiz para la pantalla táctil.

El mango de la batería se puede utilizar para llevar el sistema.


ESAOTE LATINOAMERICA S.A.


MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE



ESAOTE LATINOAMERICA S.A.



BIONIO LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TECNICO

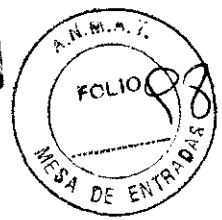

Funcionamiento del soporte para escritorio: Mylabone se puede utilizar en combinación con el soporte para escritorio.

El soporte para escritorio cuenta con un conector de alimentación, 3 puertos USB adicionales, un conector LAN, un conmutador de pedal y un conector DVI-I (con VGA analógico). También hay conectores de audio disponibles con conexiones de salida de audio y micrófono.

Mylabone se puede instalar en el soporte para escritorio y bloquearse con un botón de bloqueo. Por otro lado, se puede añadir también un soporte VESA para instalar el soporte para escritorio en un sistema de pared o en un brazo articulado

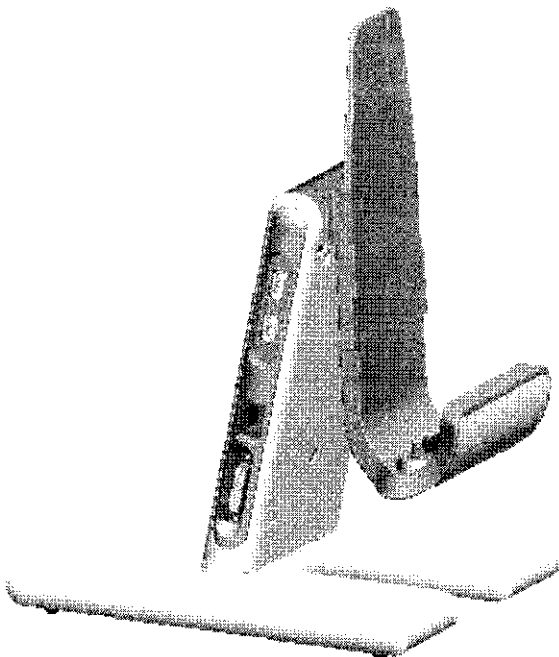

ESAOTE LATINOAMERICA S.r.l.


MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE


ESAOTE LATINOAMERICA S.A.


BIOING LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TECNICO

Configuración móvil: La configuración móvil de **Mylabone** cuenta de forma opcional con un carrito de altura regulable.

El carrito viene equipado con un accesorio de sujeción para la instalación del escáner. El carrito dispone de cuatro ruedas giratorias con frenos. El pedal ubicado en la base del carrito se puede utilizar para desbloquear el movimiento vertical de la columna. Los laterales de la superficie de trabajo se pueden utilizar para montar unos soportes para sondas.

Hay disponibles un soporte para sondas específico para la aplicación de anestesia local y un soporte para cables con el fin de garantizar que el flujo de trabajo en entornos estériles se desarrolle de forma segura y sin complicaciones.

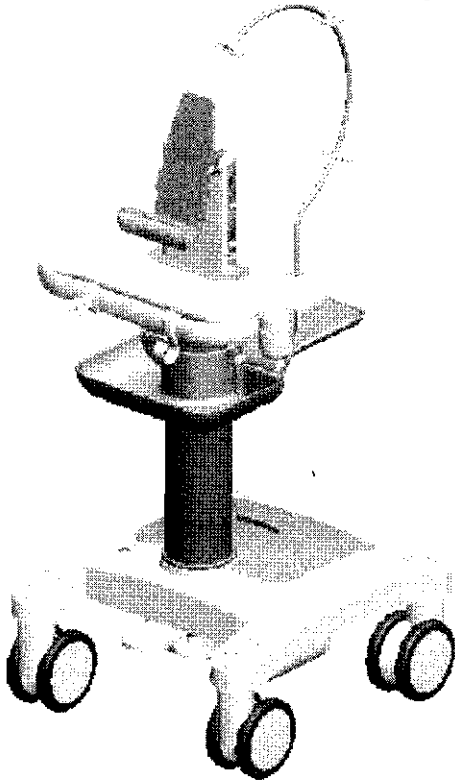

Opciones para la configuración móvil: La configuración con carrito se puede mejorar con las siguientes características y opciones adicionales:

- Una mesa de mayor tamaño con una superficie de trabajo extensible. En esta variante también se incluye un brazo articulable para mover el escáner en el área de alcance cuando se utiliza junto a la cama.
- Un soporte para escritorio/estación de conexión como accesorio de sujeción para el escáner que ofrece opciones de conectividad avanzada (disponible en el soporte para escritorio descrito anteriormente).
- Un transformador de aislamiento (con conectores de alimentación para los periféricos).
- Un módulo de batería adicional (que permite al sistema una autonomía de hasta 8 horas)

C

Batería
ESAOTE LATINOAMERICA S.A

Mariagrazia Bella
MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A
Luis Andrian
LUISE ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TECNICO



Cuando no se dispone de una red de suministro eléctrico, **Mylabone** puede funcionar con la batería interna. Una batería totalmente cargada presenta una autonomía de 3 horas.

Atención: No dejar el sistema expuesto a la luz directa del sol para evitar el sobrecalentamiento de la batería cuando Mylabone esté equipado con una batería interna.

Advertencia: Dejar de utilizar Mylabone de forma inmediata y desconectarlo de la red eléctrica si el sistema funciona de forma anómala, produce un ruido u olor inusuales o se sobrecalienta. Póngase en contacto con un representante de Esaote en cualquiera de estos casos.

La batería está siempre cargada si el escáner está conectado a la red eléctrica, sin importar si el sistema está encendido o apagado.

Cuando el usuario conecte el cable de alimentación a la red eléctrica y el adaptador de CC al escáner, aparecerá el siguiente mensaje:

Device has been connected to the external power supply

Atención: La batería se descargará con el tiempo. El tiempo máximo durante el que la batería permanece totalmente cargada son noventa (90) días. Una batería totalmente cargada deberá recargarse cada 3 meses. Una batería parcialmente cargada deberá recargarse en un intervalo de tiempo menor. Una batería de ion-litio dejará de funcionar si se descarga por completo.

Advertencia: La capacidad de la batería se reducirá con el tiempo debido al envejecimiento de la misma.

Estado de la batería e icono de carga

El icono de la batería está situado en la pantalla táctil a la derecha de las pestañas de control. El nivel de carga y el color del icono indican el estado de la batería. El tiempo de funcionamiento restante se mostrará al pulsar el icono de la batería. El icono de la batería aparecerá en rojo con un signo de exclamación intermitente sobre el mismo si el nivel de carga de la batería desciende hasta el mínimo necesario para garantizar un funcionamiento correcto. En este caso, se mostrará el siguiente mensaje:

Battery level too low: system will shutdown in 30 seconds

Mylabone se apagará automáticamente cuando se llegue al nivel mínimo necesario para el correcto funcionamiento del sistema. En este caso, se mostrará el siguiente mensaje de advertencia:

Battery reached warning level! please connect to power supply X

El icono de carga está situado junto al icono de batería. Cuando aparece este icono, significa que **Mylabone** está conectado a la red eléctrica y que la batería se ha recargado.

LED de estado de la batería y botón ON/OFF

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.
BIOING LOUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TECNICO




Hay un LED que indica el estado de la batería dentro del botón ON/OFF ubicado en el lateral izquierdo del sistema. El color del LED indica el estado de la batería y el estado de la conexión a la red eléctrica. Hay seis opciones posibles:

Color y estado del LED	Descripción
VERDE/ BRILLANTE	El sistema Mylabone esta encendido y esta conectado a la red eléctrica
VERDE/ BRILLANTE/ INTERMITENTE NARANJA	El sistema Mylabone esta apagado y conectado a la red eléctrica
NARANJA INTERMITENTE	El sistema Mylabone esta apagado y cargándose y esta conectado a la red eléctrica (batería en carga)
VERDE ATENUADO	El sistema Mylabone esta apagado y cargándose y no esta conectado a la red eléctrica (batería en carga)
VERDE ATENUADO / INTERMITENTE	El sistema Mylabone esta apagado y cargándose y no esta conectado a la red eléctrica (batería en carga)

Indicador LCD de estado de la batería

Hay un indicador LCD en el lateral de la batería interna. El LCD indica el estado de la batería aunque el sistema esté apagado.

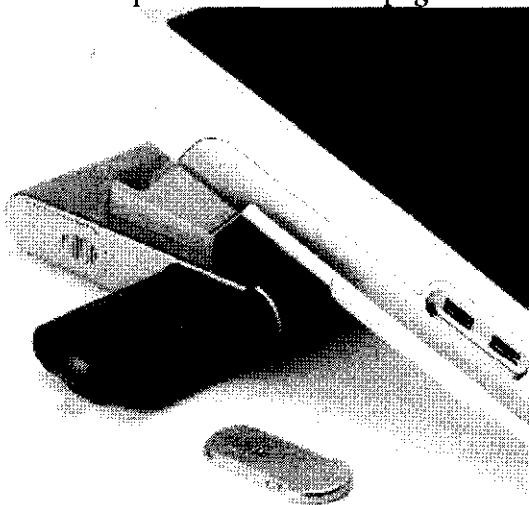

Procedimiento de carga

La forma más eficiente de cargar la batería es conectar el sistema a la red eléctrica sin encender la unidad. En estas condiciones, la batería tardará unas dos horas y media en cargarse.

La batería que no se haya utilizado durante un tiempo deberá recargarse antes de su uso.

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

Mariagrazia Bella
MARIAGRAZIA BELLA
 PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.


Bioing Luis Andrian
BIOING LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
 DIRECTOR TÉCNICO




Instalación

Ubicación de controles y puertos

Todos los controles y puertos están situados en el exterior de la consola y se pueden identificar fácilmente. A continuación, encontrará una descripción de los mismos:

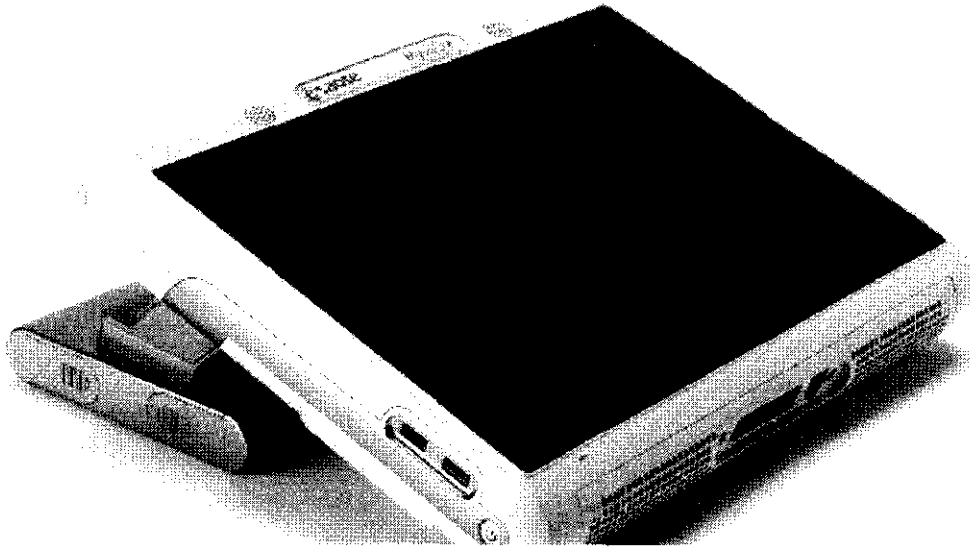

Atención: Extraer el polvo y la suciedad que se haya podido acumular en los orificios de ventilación del sistema con una aspiradora de poca potencia.

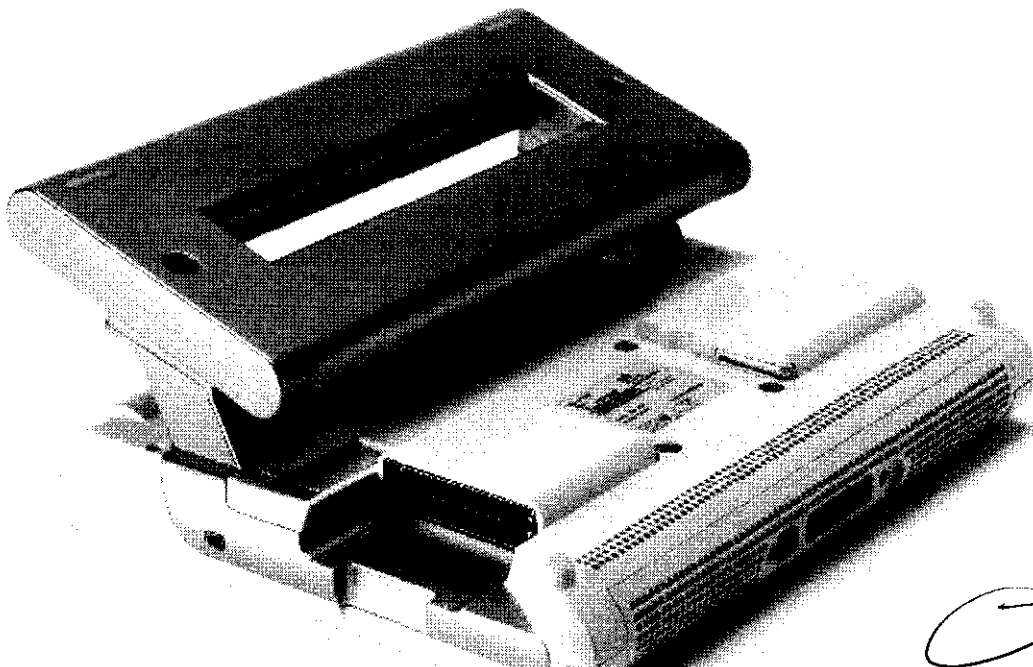


El siguiente cuadro enumera los conectores y sus usos previstos.

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.


MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.



BIUNG LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TECNICO

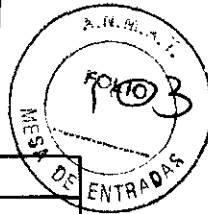

Instrucciones de uso "Ecógrafo MylabOne"

Referencia	Componente	Uso
C1	Altavoz	PC/Doppler/editor protocolos de audio
C2	Lápiz de la pantalla táctil	Almacenamiento para el lápiz
C3, C3a	Conector USB	Dispositivo de almacenamiento USB 2.0, impresora
C4	Botón de apagado	Encendido/apagado del escáner
C5	Conector de alimentación	Conexión del adaptador
C6	Conector del soporte para escritorio	Conexión de Mylabone al soporte para escritorio
C7	Micrófono	Grabación para de protocolos
C8	Conector de seguridad Kensington	Sistema antirrobo
C9	Mango el conector ZIF	Bloqueo de la sonda conectada al sistema.
C9a	Conectores sonda ZIF	Conexión de la sonda al sistema

El sistema está equipado con cuatro botones programables en el mango de la batería. Los botones se pueden programar manteniendo pulsados al mismo tiempo un botón del mango y cualquier botón de la interfaz de usuario de la pantalla táctil. Se creará un icono para el botón programado. En este icono se marca el botón correspondiente del mango.

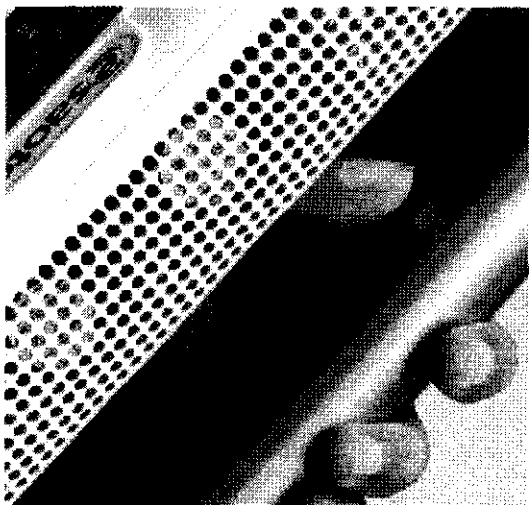

Sondas electrónicas

Las sondas deben conectarse con el conector ZIF. Asegúrese de que el mango del conector ZIF esté en posición abierta, alinee las clavijas de los dos conectores y encaje el conector para sondas con cuidado. Bloquee el mango para que quede bien sujeto.

Advertencia: No desconectar nunca la sonda mientras está activa. Pulsar el botón FREEZE antes de desconectar la sonda.

Atención: No apagar nunca el equipo antes de que haya finalizado la inicialización.

Colocación de Mylabone para la configuración de sujeción con brazo

Asegúrese de que Mylabone esté colocado en una superficie de trabajo estable y horizontal. Asegúrese de que los cuatro apoyos del sistema Mylabone estén en contacto con la superficie de trabajo.

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

Maria Grazia Bella
MARIAGRAZIA BELLA
 PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.



Bioing Luis Andrian
BIOING LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
 DIRECTOR TECNICO

Si se va a utilizar el sistema conectado a la red eléctrica, utilice un adaptador de CC.

Soporte para escritorio

Ubicación de controles y puertos

Mylabone se puede utilizar con un soporte para escritorio. De este modo, se puede crear un entorno de trabajo estable en caso de utilizar Mylabone sobre un escritorio.

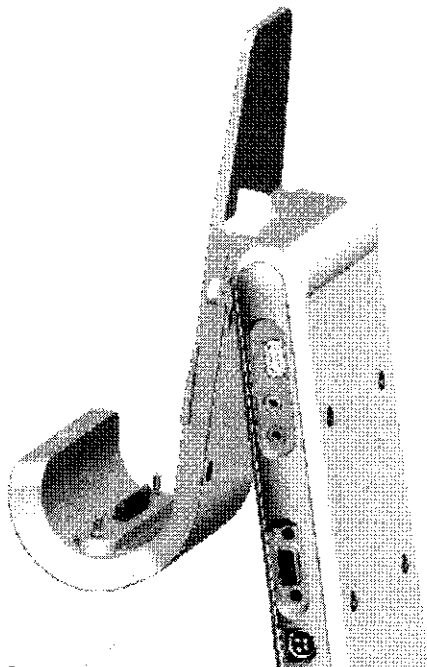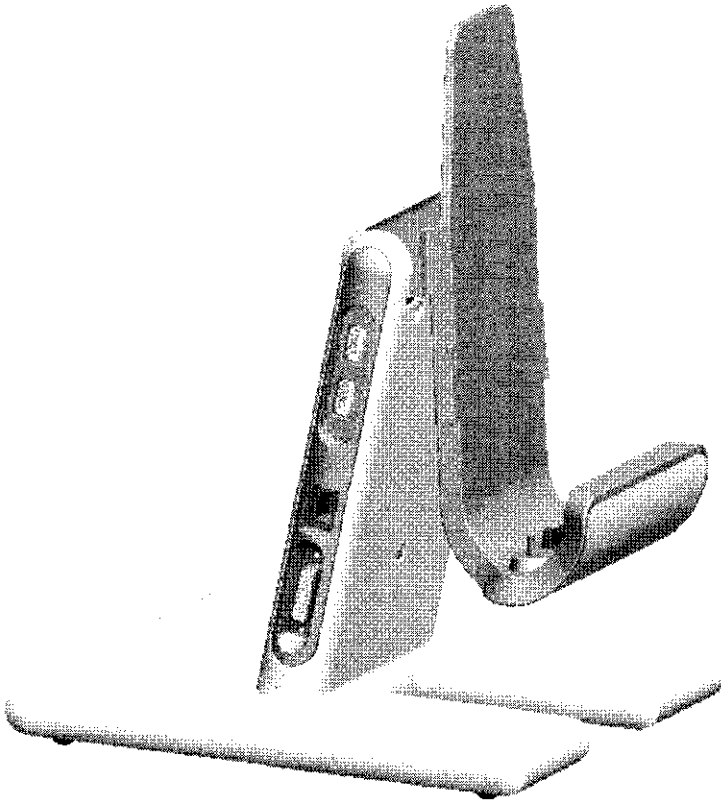


ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

Mariagrazia Bella
MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

Bioing Luis Andrian
BIOING LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TÉCNICO

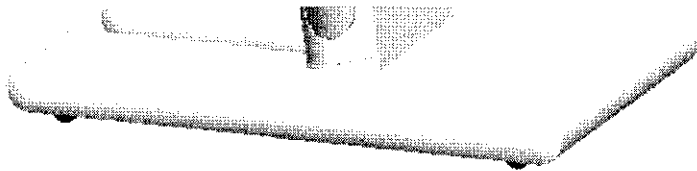

Referencia	Componente	Uso
C10, C10a	Conector USB	Dispositivo de almacenamiento USB 2.0, impresora
C11	Conector LAN	Conexión a una red
C12	Conector DVJ-I	Conector con señal digital y analógica para pantallas XVGA
C13	Botón de bloqueo	Bloqueo de Mylabone en el soporte para escritorio
C14	Conector USB	Dispositivo de almacenamiento USB 2.0, impresora
C15	Conector para micrófono	Conexión de un micrófono externo
C15a	Salida de audio	Conexión de un altavoz externo activo
C16	Conector para conmutador de pedal	Conexión de un conmutador de pedal
C17	Conector para cable de alimentación	Conexión del cable adaptador

Uso del soporte para escritorio

- Alinee la marca situada en la parte inferior del escáner con la marca del soporte para escritorio.
- Asegúrese de que las pestañas del soporte para escritorio encajen con las barras deslizantes situadas en la parte trasera del escáner.
- Introduzca el escáner cuidadosamente en el accesorio para su sujeción y asegúrese de que la parte trasera del escáner quede alineada con el ángulo del soporte para escritorio. Asegúrese de que los dos conectores de acoplamiento encajen suavemente.
- Por último, asegure **Mylabone** en el soporte para escritorio con el botón de bloqueo (C13) situado en la parte superior del soporte para escritorio.

Instalación del carrito


ESAOTE envía el carrito sin montar. El envío incluye las instrucciones de montaje correspondientes. El personal de ESAOTE abrirá el paquete y comprobará que el carrito se ha montado correctamente.

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

 MARIAGRAZIA BELLA
 PRESIDENTE


ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

 BIOING LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
 DIRECTOR TÉCNICO

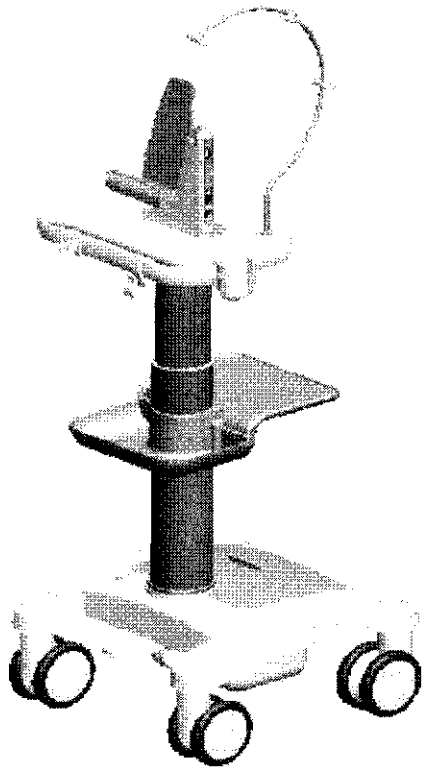


Consulte las instrucciones anteriores para montar **Mylabone** en el carrito de altura regulable. Asegúrese de que **Mylabone** esté firmemente sujeto cuando se utilice en el carrito.

Coloque los soportes para sondas en la esquina de la mesa y deslícelos sobre la superficie de trabajo.

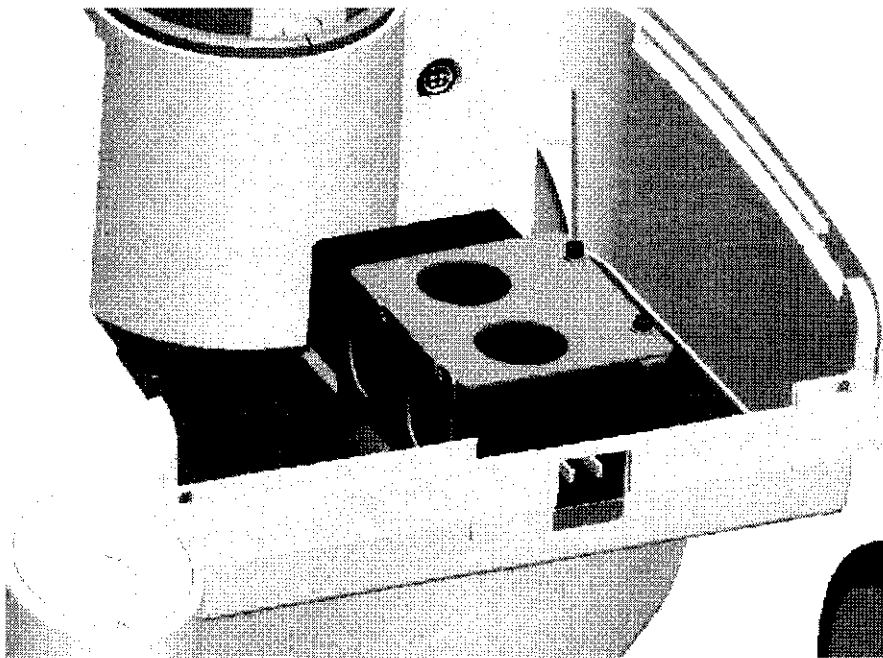



Para abastecer de energía al sistema **Mylabone** cuando está instalado en el carrito, se utiliza el mismo adaptador de CC que para el **Mylabone** en modo de funcionamiento normal. Abra la tapa de la base del carrito, coloque el adaptador de CC en el centro e

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

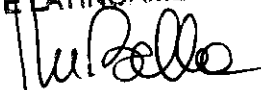
MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

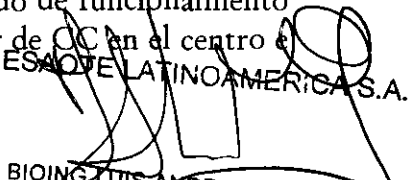
BIOING LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TECNICO

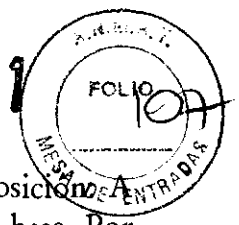

instale el soporte que se utiliza para que el adaptador no se mueva de posición. En continuación, conecte el adaptador de CC en la toma situada dentro de la base. Por último, conecte el cable de alimentación en el adaptador.

Atención: Cargar Mylabone únicamente con el adaptador de corriente eléctrica facilitado por el fabricante o uno equivalente indicado por el mismo.

Instalación de Mylabone en el carrito

Si el carrito viene equipado con un conector estándar, **Mylabone** se puede instalar en el carrito con tan solo fijar cuatro tornillos al conector situado en la parte trasera del sistema.

Si el carrito viene equipado con la estación de conexión opcional:

- Alinee la marca situada en la parte inferior del escáner con la marca de la estación de conexión.
- Asegúrese de que las pestañas de la estación de conexión encajen con las barras deslizantes situadas en la parte trasera del escáner.
- Introduzca el escáner cuidadosamente en el accesorio para su sujeción y asegúrese de que la parte trasera del escáner quede alineada con el ángulo de la estación de conexión. Asegúrese de que los dos conectores de acoplamiento encajen suavemente.
- Por último, asegure **Mylabone** a la estación de conexión.

Advertencia: Cerrar el botón de bloqueo en la parte superior de la estación de conexión para sujetar Mylabone con firmeza.

No colocar el sistema en una superficie inclinada.

No utilizar los frenos para colocar el sistema en una superficie inclinada.

Cerca de la parte inferior del carrito hay un pedal para regular la altura de trabajo. Presione el pedal cuidadosamente para desbloquear el movimiento vertical de la columna. Utilice la mesa para colocar la consola a la altura deseada. Todas las ruedas del carrito disponen de frenos.

Opciones del carrito

ESAOTE entrega las opciones para el carrito por separado. El envío incluye las instrucciones de montaje correspondientes.




ESAOTE LATINOAMERICA S.A.


MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

BIOING LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TECNICO

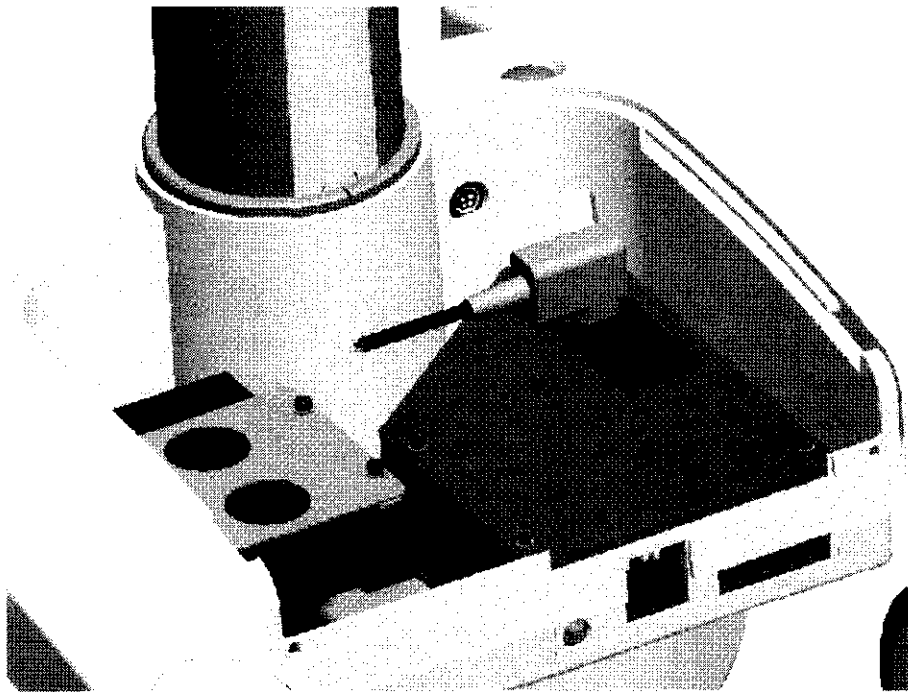

En el interior de la base del modelo avanzado de carrito, hay tres conectores de alimentación adicionales para los periféricos. Para conectar el cable de alimentación de un periférico, abra la tapa y conecte el cable correspondiente a una de las tomas libres de la base. Realice los siguientes pasos para la instalación del modelo avanzado de carrito.

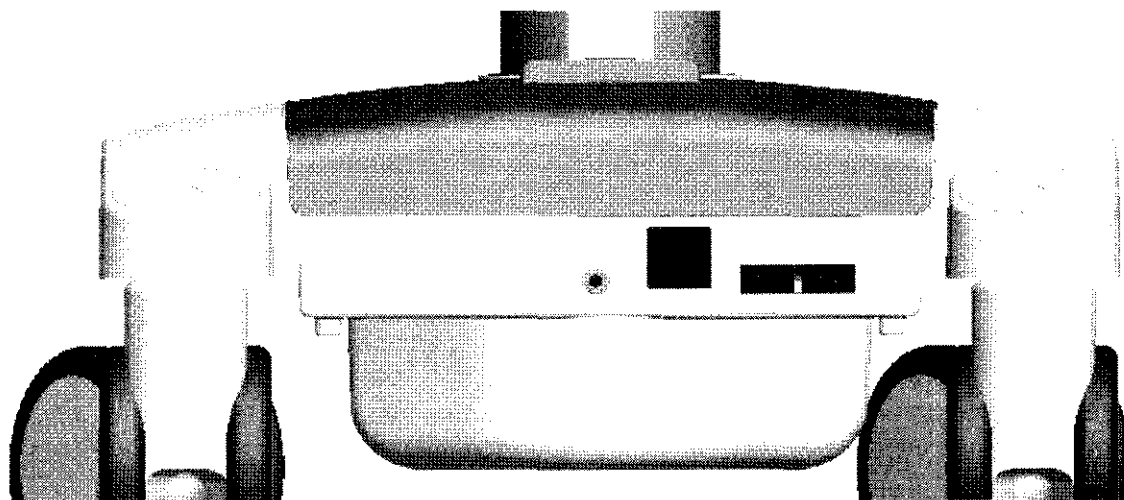

Utilice uno de los otros cables suministrados con el carrito para abastecer el sistema **Mylabone** mediante uno de las tomas del carrito (indicadas con **J2**). Enchufe el cable de alimentación y conecte el carrito a la red eléctrica.

El sistema también viene equipado con un interruptor de tensión primaria y secundaria (**J3**) y con una toma de tierra (**J1**).

Tiempo de aclimatación

Si el sistema ha estado expuesto a temperaturas superiores o inferiores a las indicadas para su funcionamiento (15-35 °C), deberá dejarse un tiempo de

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

BIOING LUIS ANDRIAN - M.N. 6240
DIRECTOR TÉCNICO



aclimatación antes de encenderlo. El siguiente cuadro indica los tiempos de espera correspondientes:

T(°C)	60	55	50	45	40	35/15	10	5	0	-5	-10	15	-20
Hotas	8	6	4	2	1	0	1	2	4	6	8	10	12

Ajuste de la pantalla LCD

Brillo

El ajuste más importante es la orientación relativa de la pantalla con respecto al usuario. La orientación de la pantalla afecta a la percepción cromática de la luz. Consulte las tonalidades de gris o la escala de color (a la izquierda de la imagen) para colocar la pantalla LCD correctamente.

Calibración

La calibración de la pantalla táctil se puede realizar en la pestaña **SETTINGS** y el botón **MENU**. Si selecciona el botón **CALIBRATE TOUCHSCREEN** en **SYSTEM SETUP**, el control de calibración se activará durante 10 segundos. Si pulsa el control, se activará el procedimiento de calibración; de lo contrario, el sistema regresará a la pantalla inicial.

Utilice el lápiz de la pantalla táctil para señalar los controles de calibración en la pantalla y seguir el procedimiento pertinente para el sistema. Cuando el procedimiento haya finalizado, el sistema regresará a la pantalla inicial.

Instalación de las unidades periféricas

El manual "Seguridad y normas" indica los requisitos de seguridad y las normas que se deben cumplir para utilizar las unidades periféricas cuya compatibilidad con el sistema **Mylabone** ha sido certificada. **Mylabone** se puede conectar a impresoras USB. Los **Mylabone** se puede conectar a impresoras USB. Los puertos disponibles para conectores USB son **C3** y **C3a** en el escáner y **C10**, **C10a** y **C14** en el soporte para escritorio y la estación de conexión. Las unidades periféricas deben contar con un conector USB tipo B para poder utilizar el cable USB facilitado.

Advertencia: La corriente máxima suministrada por los puertos USB de Mylabone es de 500 mA. Los periféricos que requieran más energía y superen este límite pueden conectarse a Mylabone SOLO si cuentan con su propia fuente de alimentación externa.

No desconectar el soporte USB con el sistema en funcionamiento. Utilizar el procedimiento de extracción segura o desconectar el soporte USB cuando el sistema esté apagado.

- Utilice uno de los otros cables suministrados con el carrito para conectar la unidad a la toma del carrito (indicada con **J2**)

Atención: utilice uno de los otros cables suministrados con el carrito para conectar la unidad a la toma del carrito (indicada con **J2)**


- Utilice uno de los otros cables suministrados con el carrito para conectar la unidad a la toma del carrito (indicada con **J2**)

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

 MARIAGRAZIA BELLA
 PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

 BIOING LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
 DIRECTOR TÉCNICO

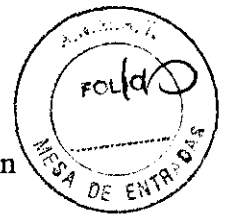

- Ahora se puede conectar el sistema a la red eléctrica y se puede poner en marcha la configuración completa.

El sistema se debe alimentar de forma que se cumplan los requisitos de seguridad eléctrica tal como se indica en el manual "Seguridad y normas". ESAOTE recomienda realizar una prueba de fuga de corriente (paciente y entorno) al llevar a cabo la instalación para comprobar que no se superen los límites aplicables indicados en la norma EN60601-1.

Si la fuente de alimentación de los periféricos no procede del carrito, estos se deben colocar fuera del área del paciente (1,5 metros de distancia y 2,5 metros de altura).

En este caso, las unidades periféricas se deben alimentar de forma que se cumplan las normas de seguridad para equipos médicos: póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica de Esaote para la correcta instalación de los mismos.

Nota: Cuando las unidades periféricas no se abastecen mediante el carrito, se recomienda no tocar al paciente y la unidad periférica al mismo tiempo.

Instalación en un carrito

- Bloquee el carrito usando los frenos.
- Coloque la unidad periférica en la bandeja para periféricos del carrito y asegúrese de que esté firmemente sujeta.

Atención: Comprobar que los periféricos estén firmemente sujetos a la bandeja para periféricos; de lo contrario, podrían caerse del carrito.


Para alimentar los periféricos correctamente, siga las instrucciones del fabricante.

Atención: Si la fuente de alimentación de las unidades periféricas no procede del carrito, estas se deben colocar fuera del área del paciente (1,5 metros de distancia y 2,5 metros de altura).


Las unidades periféricas se deben alimentar de forma que se cumplan las normas de seguridad para equipos médicos: póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica de Esaote para instalarlas correctamente.

Como medida de precaución adicional, se recomienda al usuario colocar estas unidades periféricas fuera del área del paciente siempre que sea posible. En este caso, las unidades periféricas se deben alimentar de forma que se cumplan las normas de seguridad para equipos médicos: póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica de Esaote para su correcta instalación.

Conectores adicionales

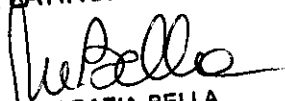ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

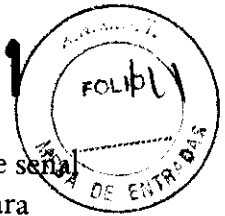
ESAOTE LATINOAMERICA S.A.
BIOUNG LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TÉCNICO



Mylabone se puede conectar a un monitor X VGA externo. Conecte el cable de señal del monitor al conector **C12** que está situado en el panel lateral del soporte para escritorio.

Se puede conectar un conmutador de pedal a **Mylabone**. El conmutador de pedal se puede configurar para ser usado con la mayoría de los botones de la pantalla. Por ejemplo, se puede utilizar para controlar el botón "Freeze" o los modos de tiempo real. El conmutador de pedal debe conectarse al conector **C16** situado en el panel lateral del soporte para escritorio (o en el carrito).

El conmutador de pedal está disponible como accesorio opcional. Consulte el apartado "Configuración del sistema" del manual "Operaciones avanzadas" para obtener más información. Si se dispone de una licencia DICOM para **Mylabone**, este se puede conectar a una red DICOM a través del puerto LAN C11.

Desplazamiento y transporte del sistema

Transporte de una configuración móvil

Cuando **Mylabone** está instalado en un carrito de altura regulable, las ruedas y el mango permiten al usuario mover la unidad con facilidad. Se deben tomar las siguientes precauciones:

Apague el sistema y desenchufe el cable de alimentación.

- Si hay sondas conectadas, asegúrese de que estén colocadas correctamente en los soportes para sondas de **Mylabone** adecuados (en el carrito) y que los cables no lleguen al suelo.
- Si también hay periféricos colocados en una plataforma externa adicional, asegúrese de que no estén conectados a **Mylabone** antes de mover la unidad de ultrasonido.
- Asegúrese de que **Mylabone** esté correcta y firmemente bloqueado en la unidad de conexión o en la estación de conexión del carrito.
- Las ruedas del carrito **Mylabone** están equipadas con frenos; asegúrese de que los frenos estén desbloqueados antes de mover la unidad de ultrasonido.
- Evite los choques innecesarios durante el desplazamiento del sistema.

Advertencia: *Comprobar que las sondas estén bloqueadas con el bloqueo de seguridad del conector en los soportes correspondientes y que los cables de las sondas estén bien sujetos en los ganchos dispuestos para tal fin durante el desplazamiento del sistema.*

Para bloquear el sistema de forma estable, es necesario bloquear al menos dos ruedas. No usar los mangos para elevar el sistema en la configuración de carrito con altura regulable.

Transporte

A la hora de transportar el sistema debe recordar lo siguiente:

- Desconectar y retirar todas las sondas y periféricos
- Utilizar los frenos para bloquear el sistema

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

BIOING LUIS ANDRIAN - M.A. 5240
DIRECTOR



- Quitar el sistema del carrito
- Cubrir el sistema adecuadamente para protegerlo durante el transporte

Mantenimiento del sistema

Este capítulo describe las principales operaciones para el mantenimiento del sistema.

Limpieza del sistema y de las unidades periféricas

La limpieza periódica del sistema y de las unidades periféricas conectadas es de vital importancia. En concreto, el sistema puede contener piezas sensibles al polvo que podrían suponer un riesgo para la fiabilidad del sistema en caso de un mantenimiento inadecuado.

Para limpiar las unidades periféricas, siga las instrucciones facilitadas por el fabricante.

Advertencia: Apagar el sistema antes de las operaciones de limpieza. Las sustancias líquidas y los espráis pueden producir descargas eléctricas.

Para limpiar el sistema, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua. En caso necesario, impregne un paño suave y limpio con un poco de detergente sin alcohol ni amoníaco y limpie la superficie. Apague el sistema y pase el paño por el exterior del mismo.

Advertencia: Comprobar que el detergente se ha evaporado completamente antes de encender el equipo.

Atención: Comprobar que el detergente se ha evaporado completamente antes de encender el equipo.

Para limpiar la pantalla LCD, frote delicadamente la superficie de la pantalla con un paño seco y suave.

10-2

- Limpie cualquier exceso de gel y residuos con un paño suave y que no deje pelusa.
- Limpie la pantalla suavemente con un paño suave ligeramente húmedo (no mojado) para retirar las partículas de polvo u otras materias.
- Frote con suavidad la parte frontal del escáner (pantalla incluida) con la toallita que se incluye como accesorio (Sani-Cloth Active) hasta que desaparezca la mancha borrosa que se forme en la pantalla. Este es el tiempo de contacto adecuado para un nivel bajo de desinfección.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar las superficies de la carcasa.
- En caso necesario, impregne un paño suave y limpio con un poco de detergente sin alcohol ni amoníaco y limpie la superficie.

Estos elementos (disponibles en la configuración móvil) se pueden retirar fácilmente de su ubicación para limpiarlos y se pueden lavar con una solución jabonosa suave. Asegúrese de que estén totalmente secos antes de volver a colocarlos en su sitio.

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

BIOING LUIS ANDRIAN
DIRECTOR

Importado por:

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.
SAN MARTIN 551, Cuerpo C, Piso 8, OF. 52
(C1004AAK) CABA
CIUDAD DE BUENOS AIRES



MYLABONE

ID.Nº

Fabricado :

ESAOTE EUROPE B.V.

Domicilio social: Philipsweg 1 , 6227 AJ Maastrich- Holanda

Fecha de fabricación:

Para operar esta unidad deberá leerse las instrucciones de uso se detallan en el manual del uso.

Las condiciones de almacenamiento y conservación, incluyendo rangos de los parámetros de detallan en el manual de uso.

Director Técnico: Bioing. Luis Andrian

MAT. Nº 5240


[Condición de venta]

Producto autorizado por ANMAT PM- 1099-30

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.


MARIAGRAZIA BELLA
PRESIDENTE

ESAOTE LATINOAMERICA S.A.

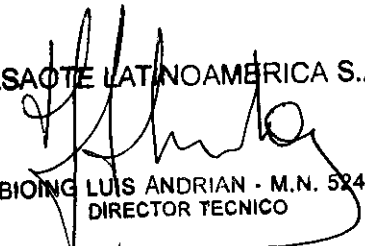
BIOING LUIS ANDRIAN - M.N. 5240
DIRECTOR TECNICO